

Ersatzteilkatalog

Campus 628



VD 914 – 07 / 2021

Berollka-aktiv
Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstrasse 16
D-74889 Sinsheim

Tel.:07261 – 7351 - 0
Fax:07261 – 7351 - 10
info@berollka.de
www.berollka.de



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2021 Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

Ersatzteilkatalog

Campus 628

Stehgerät für Kinder und Kleinkinder

Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellstmöglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle Berollka-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.

Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Produkt oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe.

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `FM:..?.` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code, bei `FB:..?.` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `A...`, `B...` und `C...` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Produkt).

Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Produkt, sowie Kundenvereinbarungen, die die Instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.


Ihr **Berollka[®]-aktiv** Team



Baugruppenübersicht

Alle unsere Stehgeräte bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Produkt ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.

Zum Beispiel gehören die Kniepelotten zur Baugruppe KNIE (= Gruppe 2).

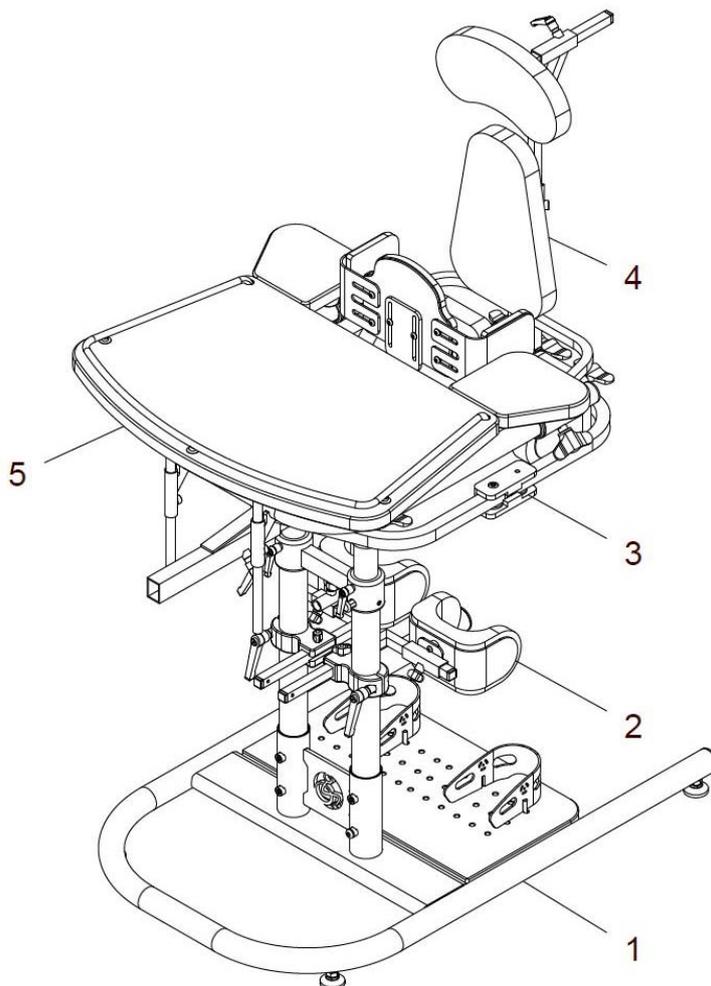

Baugruppen:

Grundgestell	Gruppe 1	Tisch.....	Gruppe 5
Knie	Gruppe 2	Zubehör.....	Gruppe 6
Becken	Gruppe 3		
Seiten- Rücken- Brustpelotten...	Gruppe 4		

Abkürzungen:

Maß A = Gesamthöhe

Maß B = Brusthöhe

Maß C = Schritt-/ Beinlänge

Maß D = Kniepelottenbreite

FM = Farbe der Metallteile

FB = Farbe der Bezüge (z. B. SKAI, ...)

o.Bild = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.
(Download ist auf unserer Homepage www.berollka.de möglich)

Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für Berollka-aktiv Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Produktes erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

Berollka-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.

Berollka-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- ◆ Beim Austausch von Teilen nur die für diese Produkte vorgesehenen Bauteile verwenden.
- ◆ Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- ◆ Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Produkt durchführen.
- ◆ Führen Sie nach der Reparatur des Produkts eine Funktionsprüfung durch.
- ◆ Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Produktes dem Patienten übergeben.

Anzugsdrehmomente Schrauben:


- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm

Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben




Grundgestell

Gruppe 1

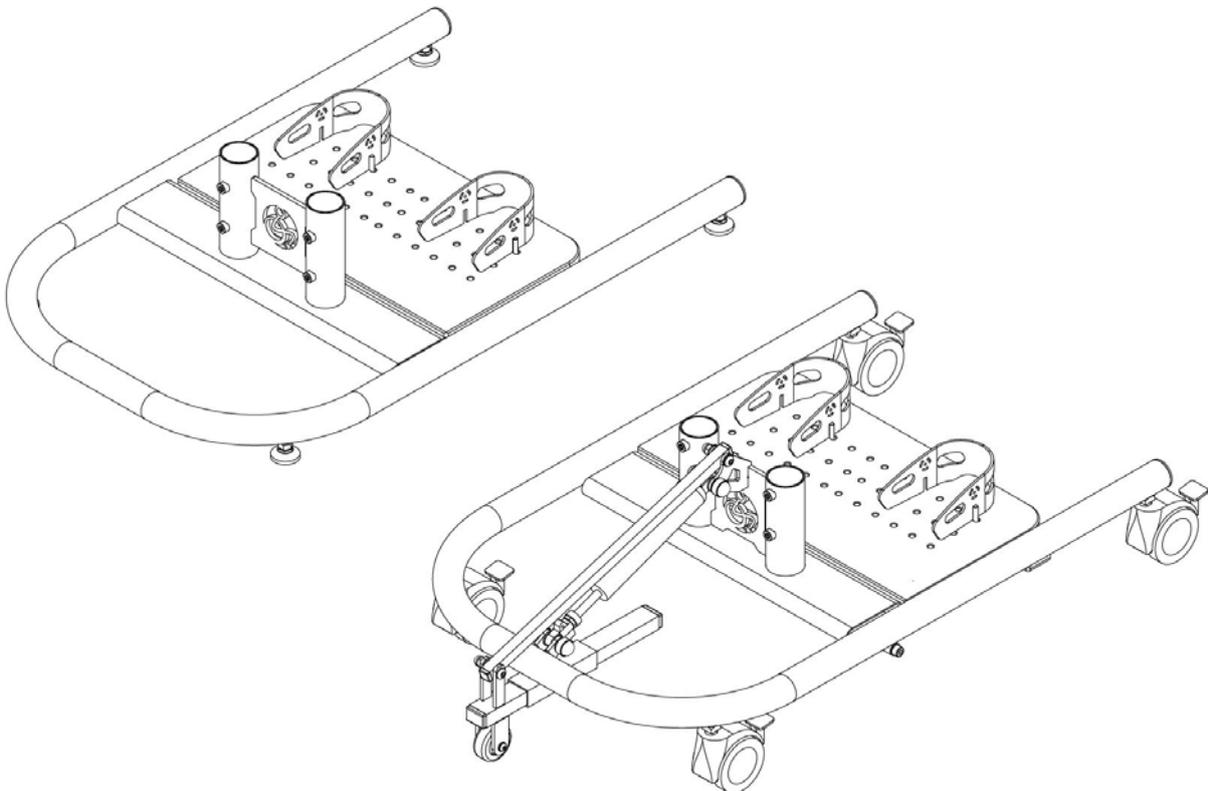


Grundgestell Standard 628 (mit Rollen)

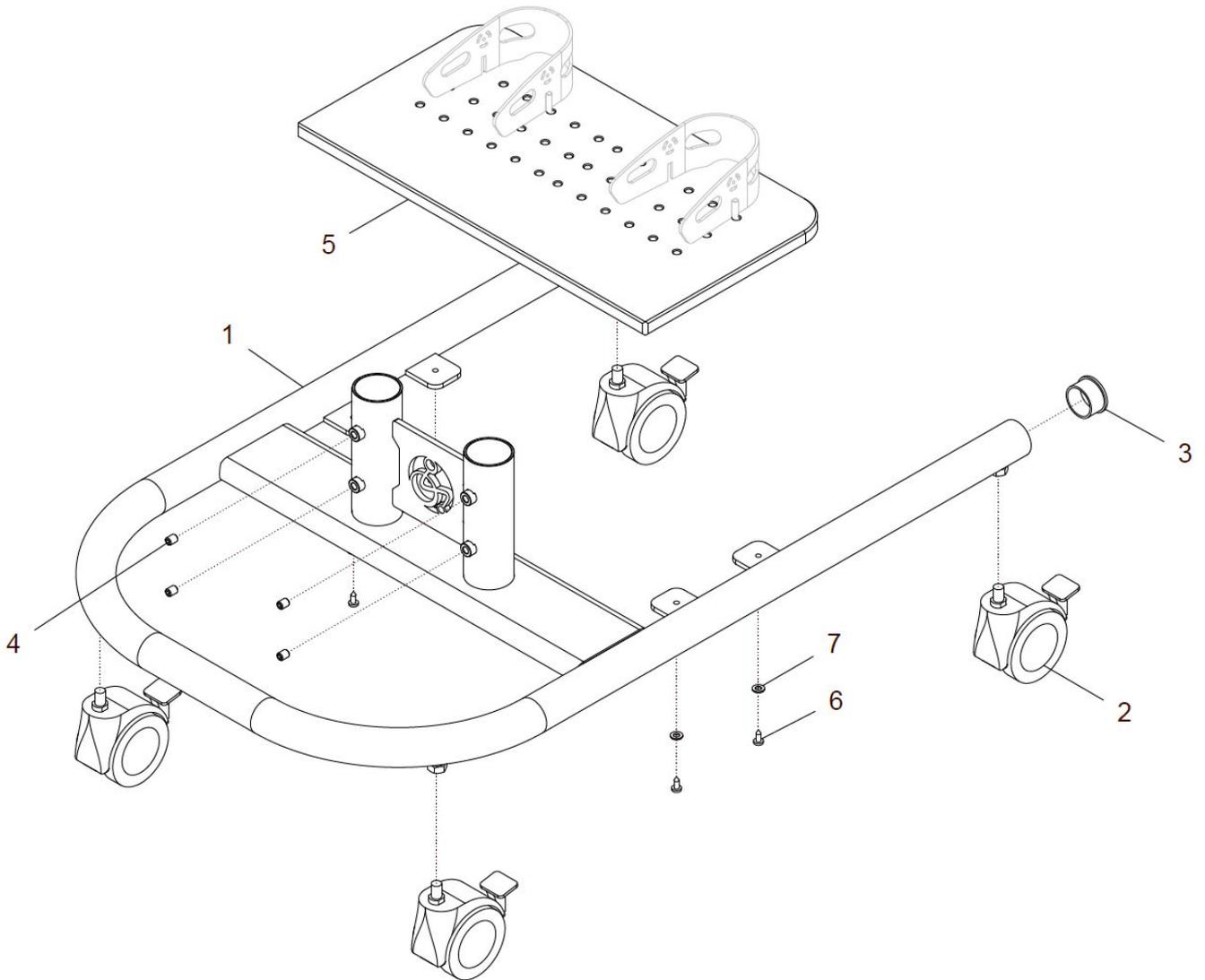


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	G28 110 00	Grundgestell / Rahmen mit Transportrollen CAMPUS 628 kpl. mit Doppellenkrollen und Fußplatte FM: ?	1 St.
1	G28 111 51	Grundgestell CAMPUS 628 FM: ?	1 St.
2	05 210 02	Doppellenkrolle 75mm mit Feststeller	4 St.
3	04 210 20	Verschlussstopfen Ø38 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 - DIN 913 schwarz	4 St.
5	G28 112 31	Fußplatte Campus 628 / 628A	1 St.
6	01 501 50	Linsen-Blechschrabe mit Kreuzschlitz 5x20 – ISO 7049	4 St.
7	01 320 61	Scheibe 5,3 – ISO 7090 schwarz	4 St.

Grundgestell Standard 628 (mit Stellfüßen)

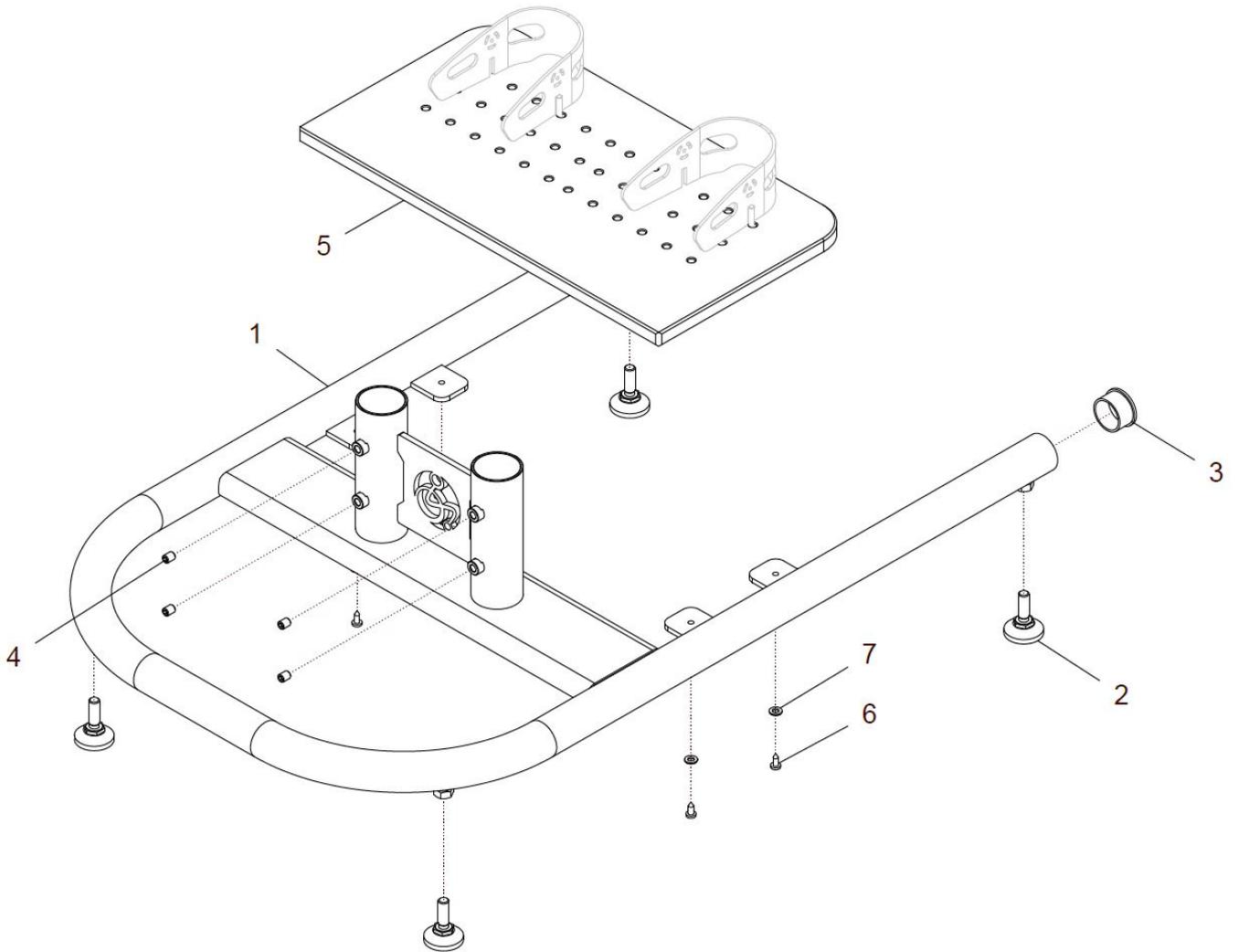


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	G28 110 20	Grundgestell / Rahmen mit Stellfüßen CAMPUS 628 kpl. mit Stellfüßen und Fußplatte FM: ?	1 St.
1	G28 111 51	Grundgestell CAMPUS 628 FM: ?	1 St.
2	04 210 70	Stell- / Justierfuß Ø38mm – M10x30	4 St.
3	04 210 20	Verschlussstopfen Ø38 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 - DIN 913 schwarz	4 St.
5	G28 112 31	Fußplatte Campus 628 / 628A	1 St.
6	01 501 50	Linsen-Blechschrabe mit Kreuzschlitz 5x20 – ISO 7049	4 St.
7	01 320 61	Scheibe 5,3 – ISO 7090 schwarz	4 St.

Grundgestell Allround 628 (mit Transportrollen) kpl.

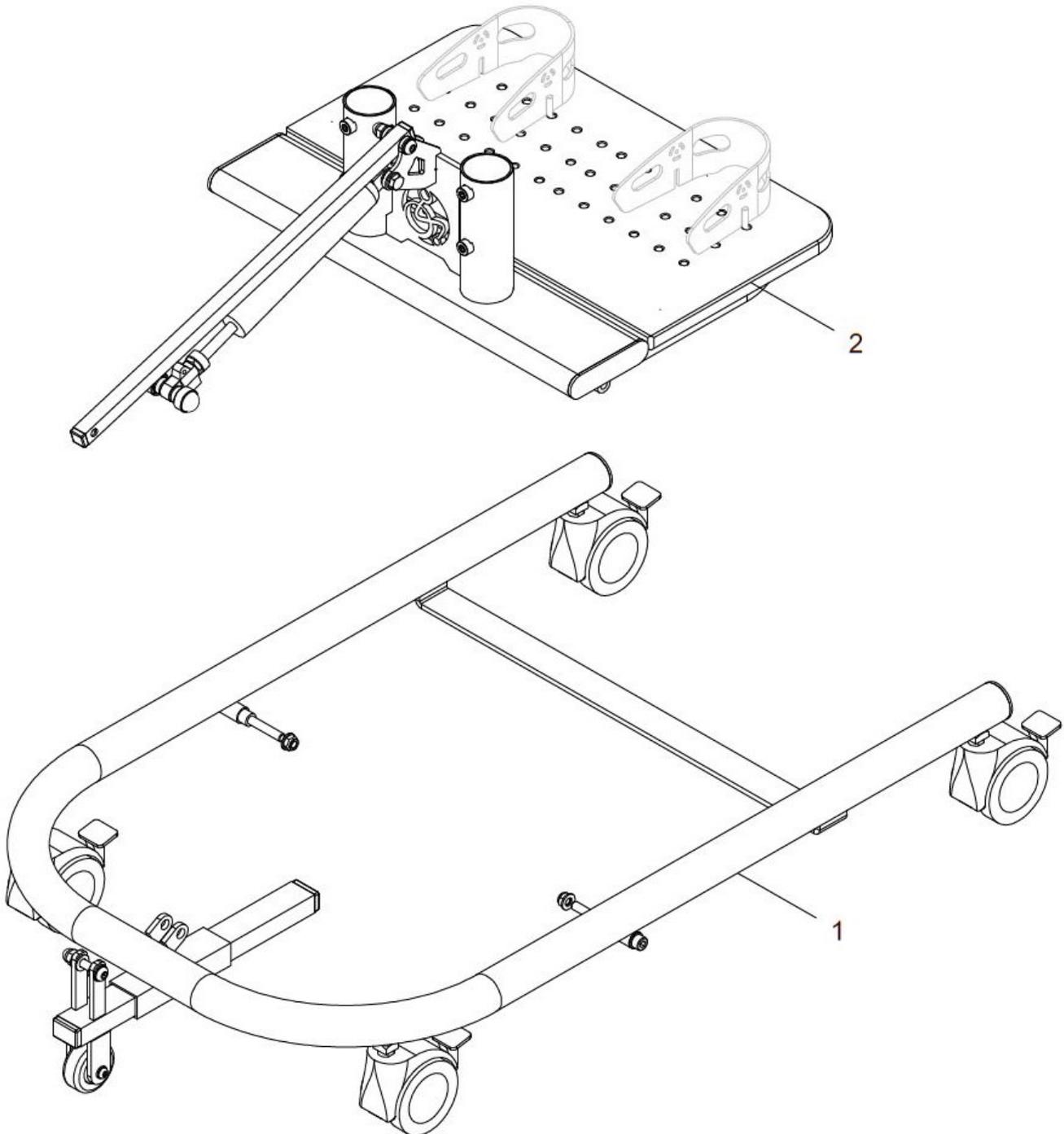


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	G28 120 00	Grundgestell ALLROUND CAMPUS 628 kpl. Untergestell mit Wippe, Fußplatte, Verstellmechanismus und mit Transportrollen 75mm FM: ?	1 St.
1	G28 121 00	Untergestell ALLROUND CAMPUS 628 kpl. mit Ausgleichsstütze und Transportrollen 75mm FM: ?	1 St.
2	G28 122 00	Wippe-Grundgestell ALLROUND oben CAMPUS 628 kpl. mit Abstützung, Gasdruckfeder und mit Fußplatte FM: ?	1 St.

Grundgestell Allround 628 (mit Transportrollen)

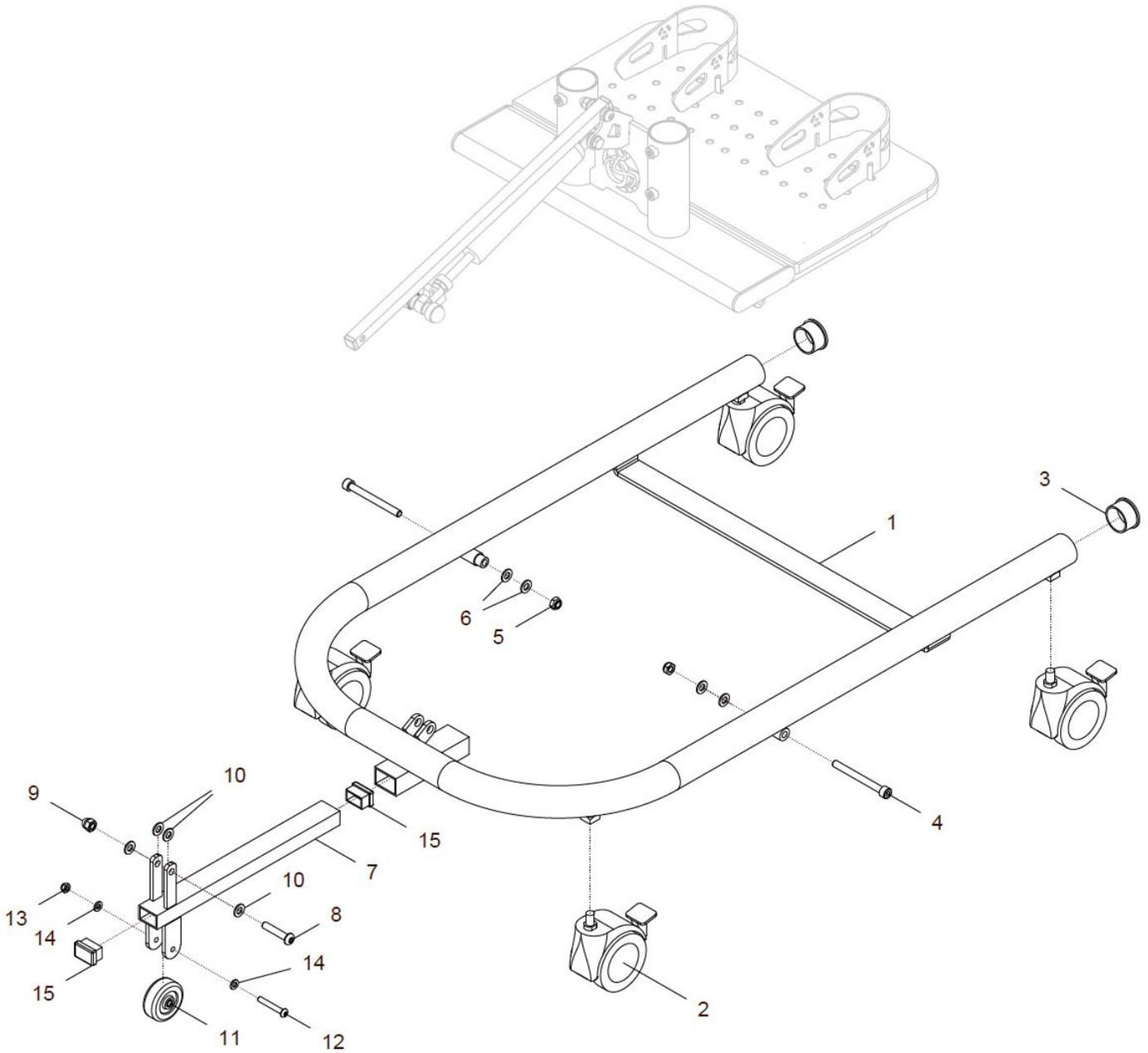

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	G28 121 00	Grundgestell ALLROUND Campus 628 kpl. mit Ausgleichsstütze und mit Transportrollen 75mm FM: ?	1 St.
1	G28 121 01	Untergestell-Grundrahmen CAMPUS Allround 628 FM: ?	1 St.
2	05 210 02	Doppellenkrolle 75mm mit Feststeller	4 St.
3	04 210 20	Verschlussstopfen Ø38 schwarz	2 St.
4	01 112 49A	Sechskantschraube M8x110 – ISO 4014 vz	2 St.
5	01 210 84	Hut-Mutter M8 – DIN 985 A2	2 St.
6	01 320 03	Scheibe 8,4 – ISO 7090	4 St.
7	G20 121 31	Ausgleichsstütze Campus Allround 620/625/628	1 St.
8	01 152 43	Linsenkopfschraube mit Innensechskant – M8x40 – ISO 7380	1 St.
9	01 210 64	Hutmutter M8 – DIN 986	1 St.
10	01 320 03	Scheibe 8,4 – ISO 7090	4 St.
11	05 201 70	Gleitlagerrad Ø50	1 St.
12	01 152 26	Linsenkopfschraube mit Innensechskant – M6x40 – ISO 7380	1 St.
13	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 985 A2	1 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
15	04 210 35	Verschlussstopfen 30x20	2 St.


Wippe-Grundgestell Allround oben 628

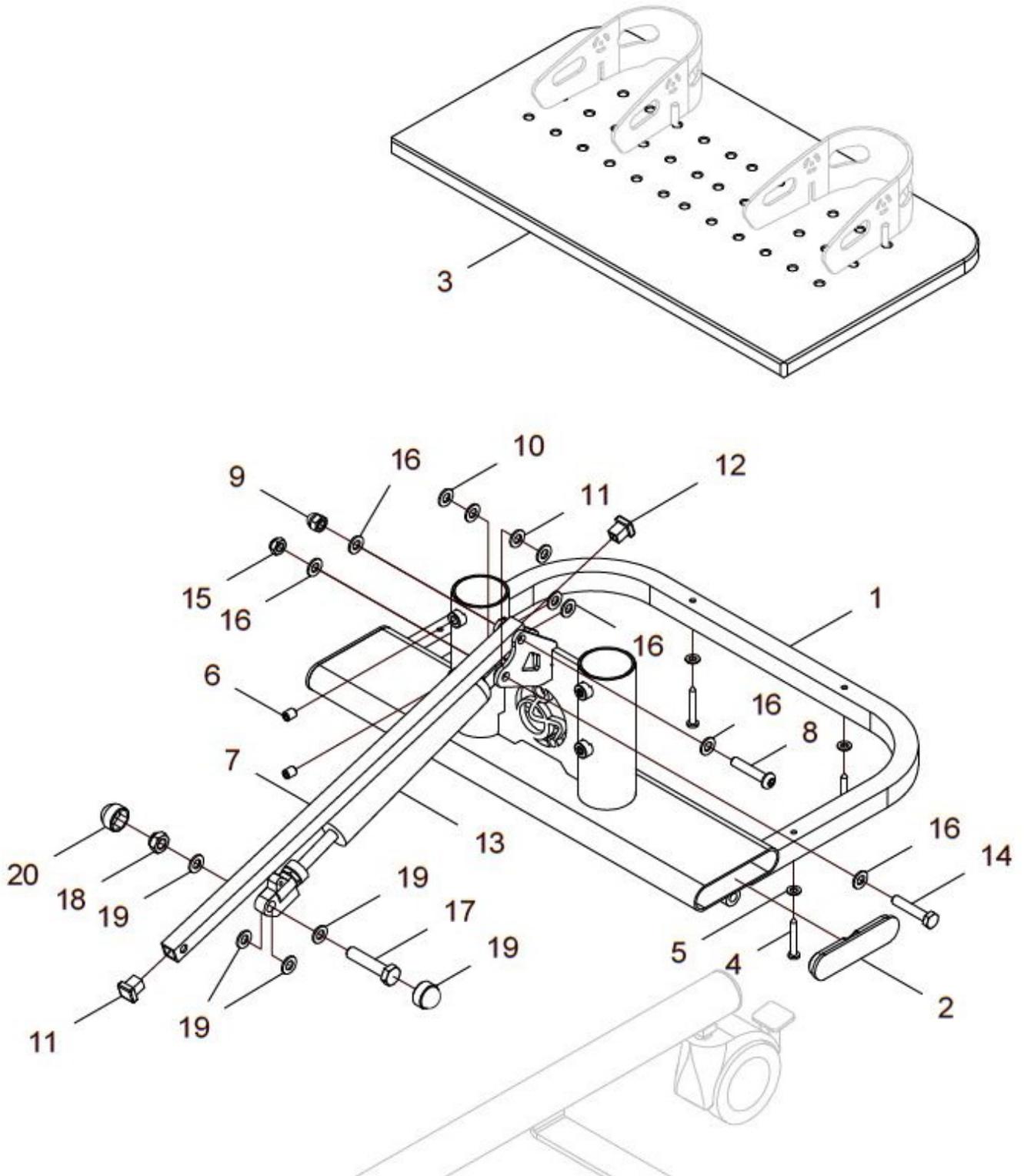

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	G28 122 00	Wippe-Grundgestell ALLROUND oben CAMPUS 628 kpl. mit Abstützung, Gasdruckfeder und mit Fußplatte FM: ?	1 St.
1	G28 122 01	Wippe-Grundgestell Campus Allround 628 FM: ?	1 St.
2	G20 122 97	Verschlussstopfen 100x25 schwarz	2 St.
3	G28 112 31	Fußplatte Campus 628 / 628A	1 St.
4	01 501 47	Linsen-Blechschrabe 4,5x35	4 St.
5	01 320 61	Scheibe 5,3 – ISO 7090 schwarz	4 St.
6	01 131 47S	Gewindestift schwarz M8x10 – DIN 913	4 St.
7	G28 121 32	Abstützung 628 (Länge = 435mm)	1 St.
8	01 152 43	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M8x40 – ISO 7380 A2	1 St.
9	01 210 64	Hutmutter M8 – DIN 986 vz	1 St.
10	01 310 03	Scheibe 8,4 – DIN 125 PE	2 St.
11	01 328 06	Passscheibe 8,4 x 1,0 – DIN 988	2 St.
12	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
13	G28 123 50	Gasfeder mit Auslösekopf (320N / 02 801 13)	1 St.
14	01 112 51	Sechskantschraube M8x40 – ISO 4014	1 St.
15	01 210 84	Hutmutter M8 – DIN 985	1 St.
16	01 320 04	Scheibe 8,2 – DIN 125	6 St.
17	01 112 51	Sechskantschraube M10x40 – ISO 4014	1 St.
18	01 210 05	Mutter M10 – DIN 985	1 St.
19	01 320 04	Scheibe 10,5 – DIN 125	4 St.
20	04 211 05	Abdeckkappe M10	2 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
o.B.	G28 123 11	Bowdenzug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround Rohrlänge: 300mm Tischmaß A: 46 – 68	1 St.
o.B.	G28 123 12	Bowdenzug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround Rohrlänge: 400mm Tischmaß A: 56 - 78	1 St.
o.B.	G28 123 13	Bowdenzug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround Rohrlänge: 500mm Tischmaß A: 66 - 88	1 St.
o.B.	G28 123 20	Auslösezug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround mit Hebel und Abstützung (für Tischrahmen) Tischmaß A: ???	1 St.

Fußschalen / Fersenschalen

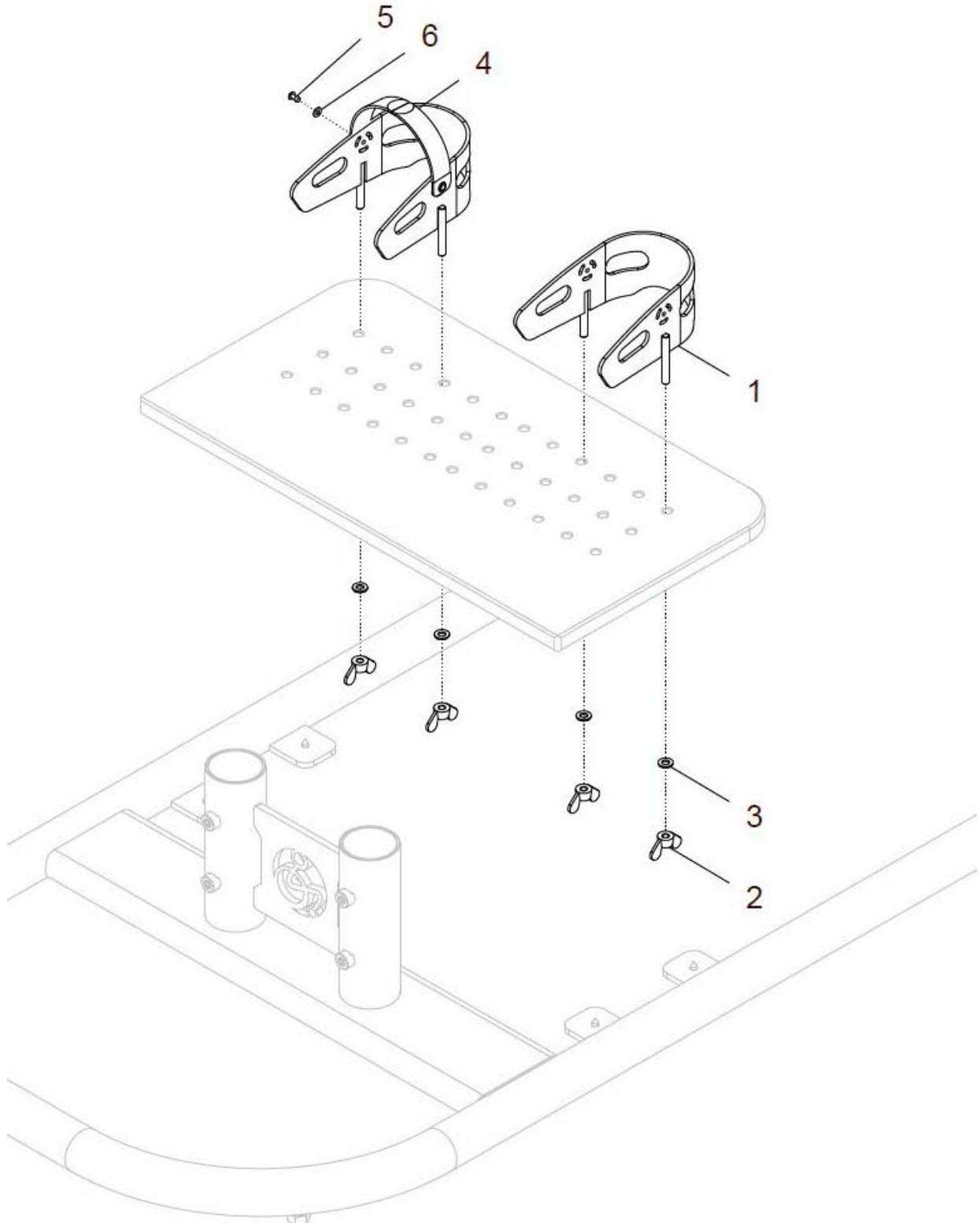


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	G25 131 50	Fußschale (Fersenschale) klein schwarz mit Fußriemen kpl. mit Bolzen M6, mit Flügelmutter und mit Fußriemen B=8,5cm / L=13,5cm	2 St.
1 – 3	G25 131 00	Fußschale (Fersenschale) klein schwarz kpl. mit Bolzen M6 und mit Flügelmutter B=8,5cm / L=13,5cm	2 St.
1	G25 131 01	Fußschale <u>klein</u> (B=8,5cm / L=13,5cm)	2 St.
2	01 216 03	Flügelmutter M6 - DIN 315 vz	4 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - ISO 7090 A2	4 St.
4 – 6	G20 131 55	Fußriemen für Fußschale kpl. Fußriemen mit Blindniet und U-Scheibe	2 Set
4	G20 131 59	Fußriemen für Fußschale L255 (2 Streifen für 1 Fußschale)	2 Set
5	01 419 03	Blindniet F3x6	4 St.
6	01 321 10	U-Scheibe Ø3,2 x 9 x 0,8	4 St.

Mittelsäulen Campus 628

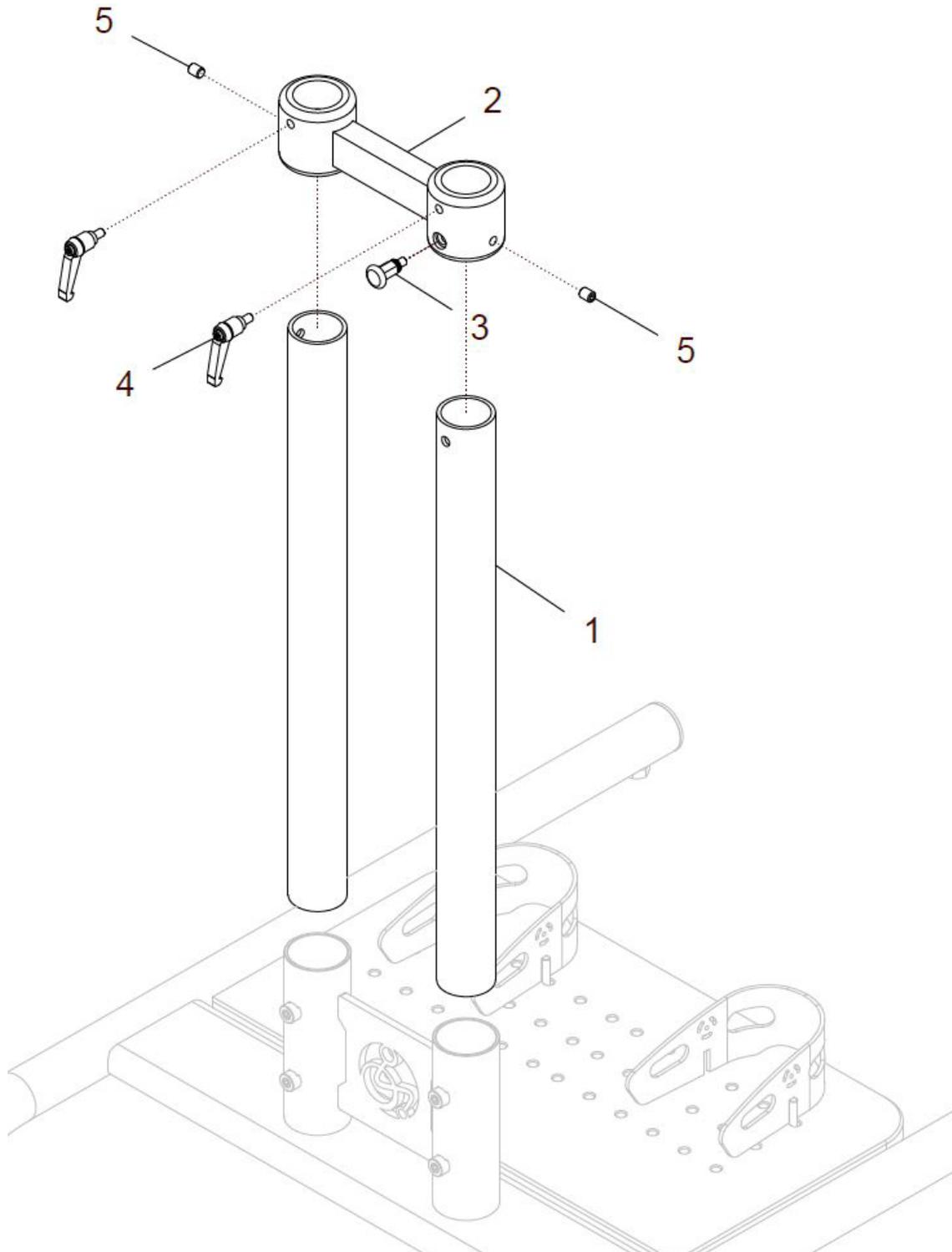

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	G28 102 00	Mittelsäulenpaar unten CAMPUS 628 kpl. mit Querträger Länge Mittelsäulen: ?	1 Set
1a	G28 101 51	Mittelsäulenrohr Campus 628 – 300mm	2 St.
1b	G28 101 52	Mittelsäulenrohr Campus 628 – 400mm	2 St.
1c	G28 101 53	Mittelsäulenrohr Campus 628 – 500mm	2 St.
2	G28 102 10	Querträger Mittelsäule für Campus 628	1 St.
3	01 133 21	Rastbolzen (ohne Verriegelung)	1 St.
4	01 190 08	Klemmhebel M8x15 klein	2 St.
5	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913 vz	2 St.


Tischhöhenverstellung mit Gasdruckfeder

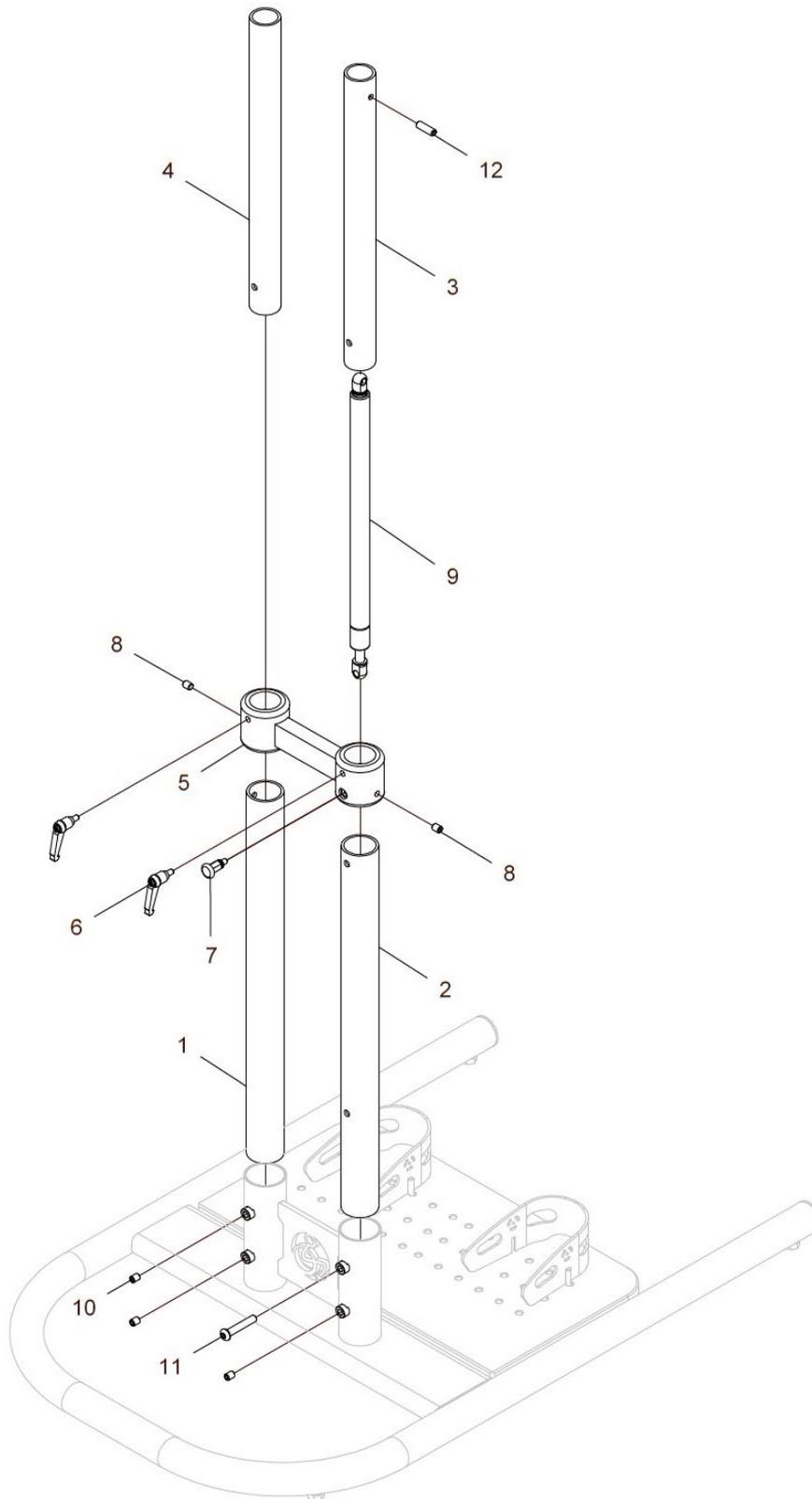


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	G28 115 00	Mittelsäulen - Set Tischhöhenverstellung Gasdruckfeder kpl. für Campus 628 Länge Mittelsäule: ? (400mm oder 500mm)	1 Set
1a	G28 101 52	Mittelsäulenrohr Campus 628 – 400mm	1 St.
1b	G28 101 53	Mittelsäulenrohr Campus 628 – 500mm	1 St.
2a	G28 115 22	Mittelsäulenrohr Gasfeder Campus 628 – 400mm	1 St.
2b	G28 115 23	Mittelsäulenrohr Gasfeder Campus 628 – 500mm	1 St.
3	G28 115 11	Verstellrohr Ø35 oben für Tischhöhenverstellung Campus 628	1 St.
4	G28 101 61	Verstellrohr Ø35 oben Campus 628	1 St.
5	G28 102 10	Querträger Mittelsäule für Campus 628	1 St.
6	01 190 08	Klemmhebel M8x15 klein	2 St.
7	01 133 21	Rastbolzen (ohne Verriegelung)	1 St.
8	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913 vz	2 St.
9	G20 115 71	LIFT-O-MAT ohne Verlängerung (0280155)	1 St.
10	01 131 47S	Gewindestift schwarz M8x10 – DIN 913 zns	3 St.
11	01 152 45	Linsenkopfschraube mit Innensechskant – M8x50 – ISO 7380 Hinweis: bei 400mm Mittelsäule unten verschraubt bei 500mm Mittelsäule oben verschraubt	1 St.
12	01 131 49	Gewindestift – M8x35 – DIN 913	1 St.

Knie

Gruppe 2

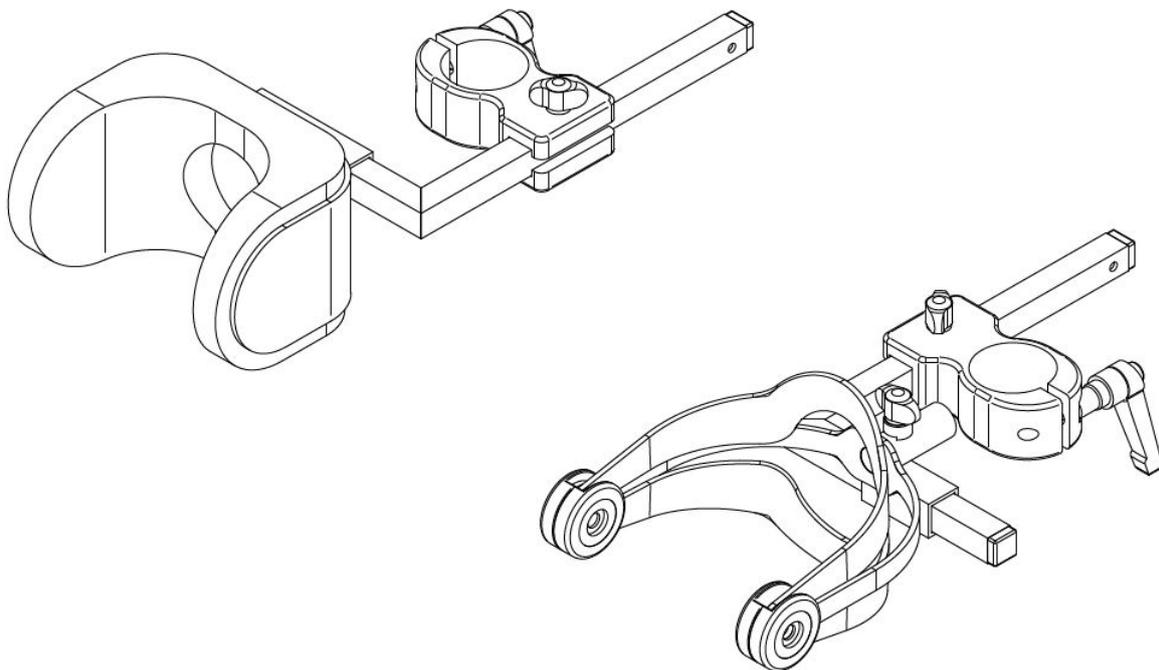


Kniepelotte standard, mit Uni-Halter

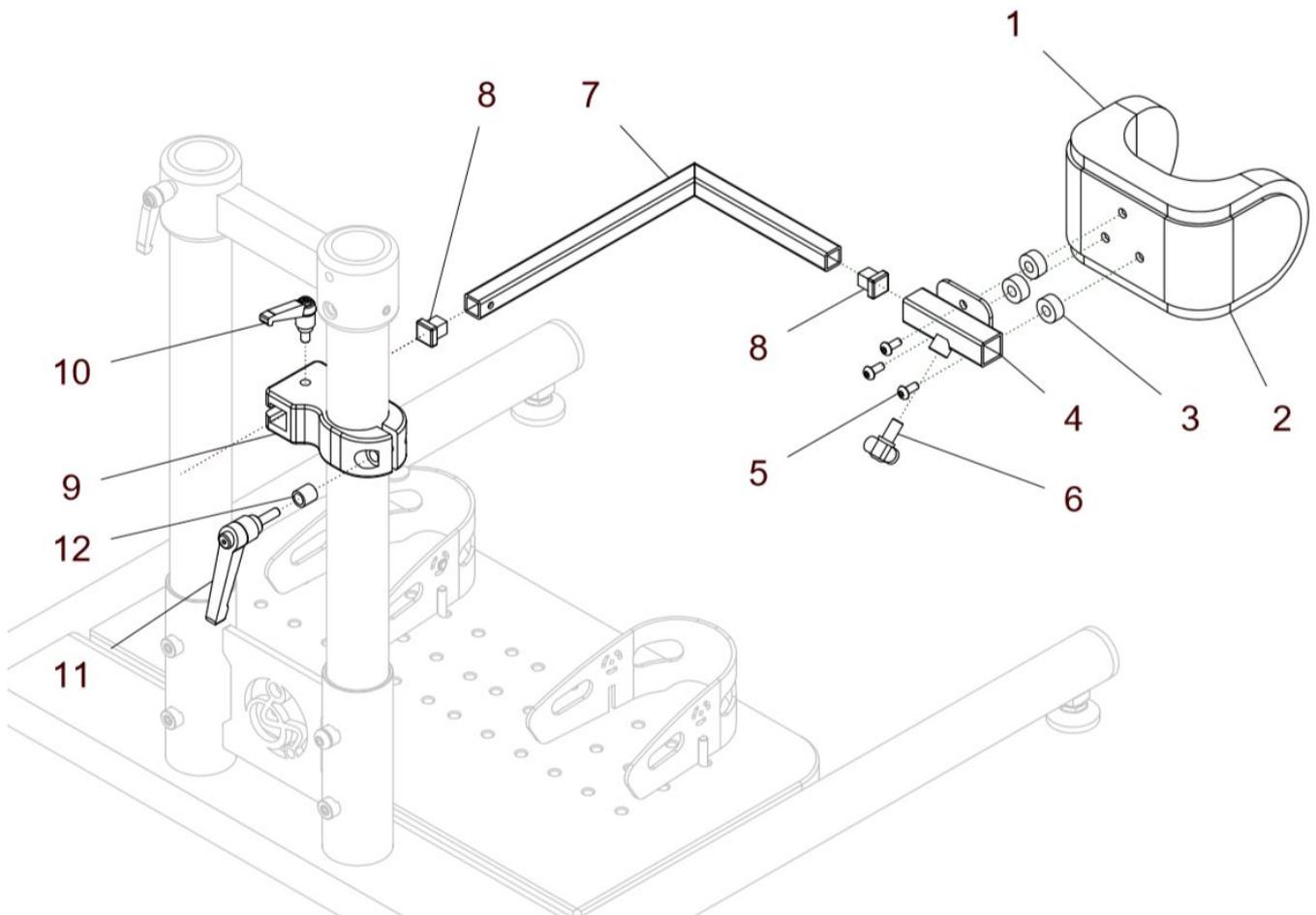


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a, 3 - 12	G28 210 00	Kniepelotte standard Gr. M mit Kniehalter kpl. mit Kniehalter und Kniehalterrohr Größe: M (bis 11cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1b, 2b, 3 - 12	G28 210 05	Kniepelotte standard Gr. S mit Kniehalter kpl. mit Kniehalter und Kniehalterrohr Größe: S (bis 8cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1a, 2a - 6	G28 211 50	Kniepelotte standard Gr. M kpl. mit Bezug und UNI-Halter 20x20 FB: ?	2 St.
1b, 2b - 6	G30 211 50	Kniepelotte standard Gr. S kpl. mit Bezug und UNI-Halter 20x20 FB: ?	2 St.
1a, 2a - 3	G28 211 60	Kniepelotte standard Gr. M mit Bezug (ohne Uni-Halter) FB: ?	2 St.
1b, 2b - 3	G30 211 60	Kniepelotte standard Gr. S mit Bezug (ohne Uni-Halter) FB: ?	2 St.
1a	G28 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. M	2 St.
1b	G30 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. S	2 St.
2a	G28 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. M FB: ?	2 St.
2b	G30 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. S FB: ?	2 St.
3	01 301 02	Scheibe Kunststoff Ø8,4	6 St.
4	G20 212 01	Uni-Halter für Kniepelotten standard	2 St.
5	01 162 07	Zylinderschraube mit Innensechskant - M5x16 – ISO 4762 schwarz	6 St.
6	01 191 09	Flügelschraube - M8x15 mini-wing	2 St.
7 - 12	G28 211 00	Kniehalter klein kpl. mit Kniehalterrohr und Klemmhebel	2 St.
7	G28 211 03	Kniehalterrohr 628 L-Form	2 St.
8	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	4 St.
9	G28 211 51	Kniehalter 628	2 St.
10	01 190 08	Klemmhebel - M8x15 klein	2 St.
11	01 190 36	Klemmhebel klein – M8x35	2 St.
12	G28 211 59	Abstandshülse für Klemmhebel	2 St.

Kniepelotte standard, winkelverstellbar (mit Kugelgelenk)

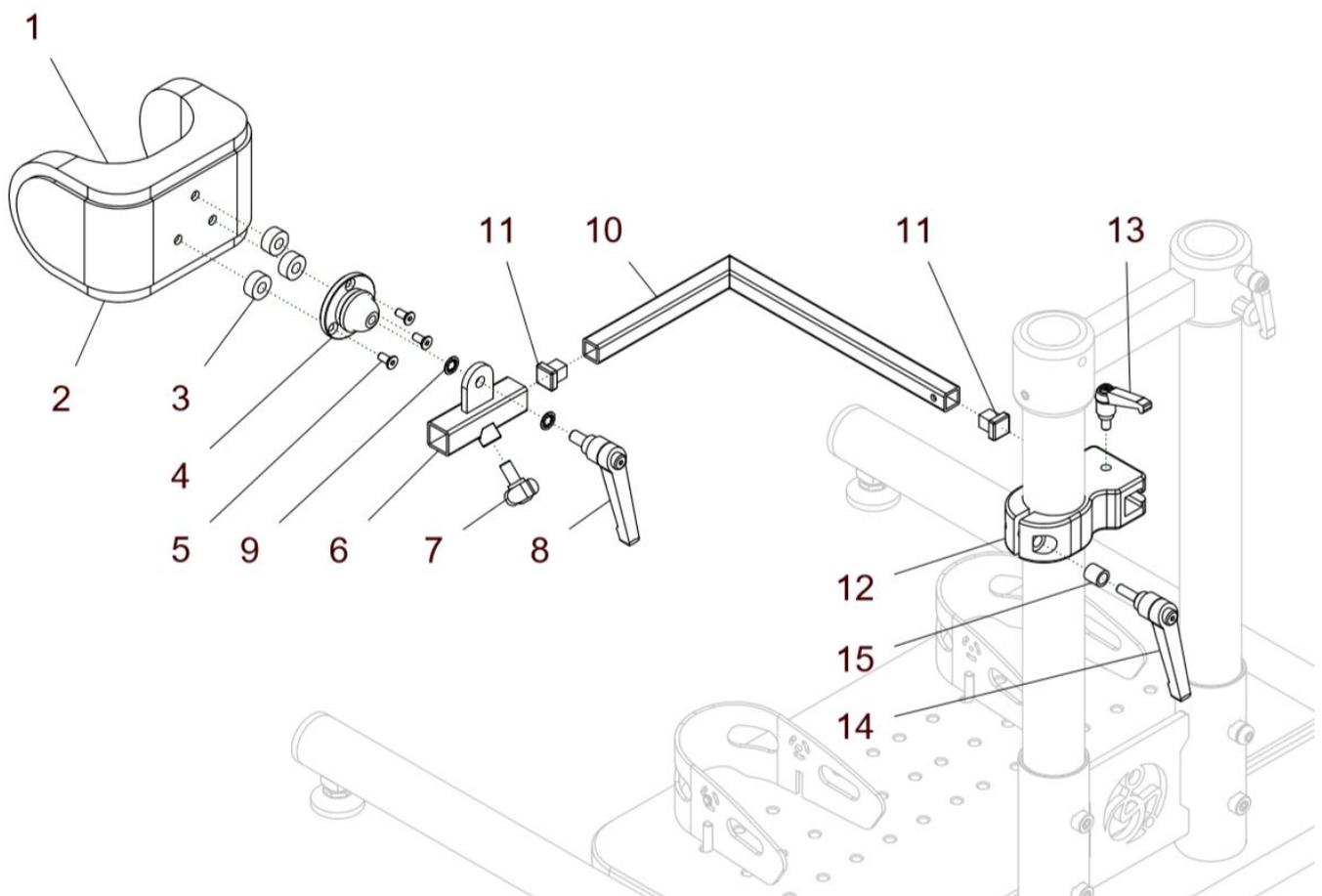


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	G28 210 50	Kniepelotte standard Gr. M winkelverstellbar kpl. mit Kniehalter und Kniehalterrohr mit Kugelgelenk Größe: M (bis 11cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1 – 15	G28 210 55	Kniepelotte standard Gr. S winkelverstellbar kpl. mit Kniehalter und Kniehalterrohr mit Kugelgelenk Größe: S (bis 8cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1a, 2a - 9	G28 214 50	Kniepelotte standard Gr. M winkelverstellbar (o. Kniehalter) kpl. mit Bezug und Kniehaltergelenk FB: ?	2 St.
1b, 2b - 9	G28 214 55	Kniepelotte standard Gr. S winkelverstellbar (o. Kniehalter) kpl. mit Bezug und Kniehaltergelenk FB: ?	2 St.
1a, 2a – 3	G28 211 60	Kniepelotte standard Gr. M mit Bezug FB: ?	2 St.
1b, 2b – 3	G30 211 60	Kniepelotte standard Gr. S mit Bezug FB: ?	2 St.
1a	G28 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. M	2 St.
1b	G30 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. S	2 St.
2a	G28 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. M FB: ?	2 St.
2b	G30 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. S FB: ?	2 St.
3	01 301 02	Scheibe Kunststoff Ø8,4	6 St.
4 – 9	G20 214 00	Kniehaltergelenk winkelverstellbar (Kugelgelenk) kpl. (ohne Kniepelotte)	2 St.
4	G10 401 10	Kugelgelenk-Set (Trägerpfanne / Kugel / Klemmpfanne)	2 St.
5	01 120 03	Senkschraube mit Innensechskant - M5x16 – DIN 7991	6 St.
6	G20 214 01	UNI-Halter für Kniepelotten winkelverstellbar	2 St.
7	01 191 09	Flügelschraube - M8x15 mini-wing	2 St.
8	01 190 01	Klemmhebel groß - M8x20	2 St.
9	01 330 02	Schnorr-Scheibe NM 8vz	4 St.
10 – 15	G28 211 00	Kniehalter klein mit Kniehalterrohr und Klemmhebel	2 St.
10	G28 211 03	Kniehalterrohr 628 L-Form	2 St.
11	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	4 St.
12	G28 211 51	Kniehalter 628	2 St.
13	01 190 08	Klemmhebel - M8x15 klein	2 St.
14	01 190 35	Klemmhebel klein – M8x30	2 St.
15	G28 211 59	Abstandshülse für Klemmhebel	2 St.

Kniepelotte „SHARK“ mit Aufnahme Uni-Halter

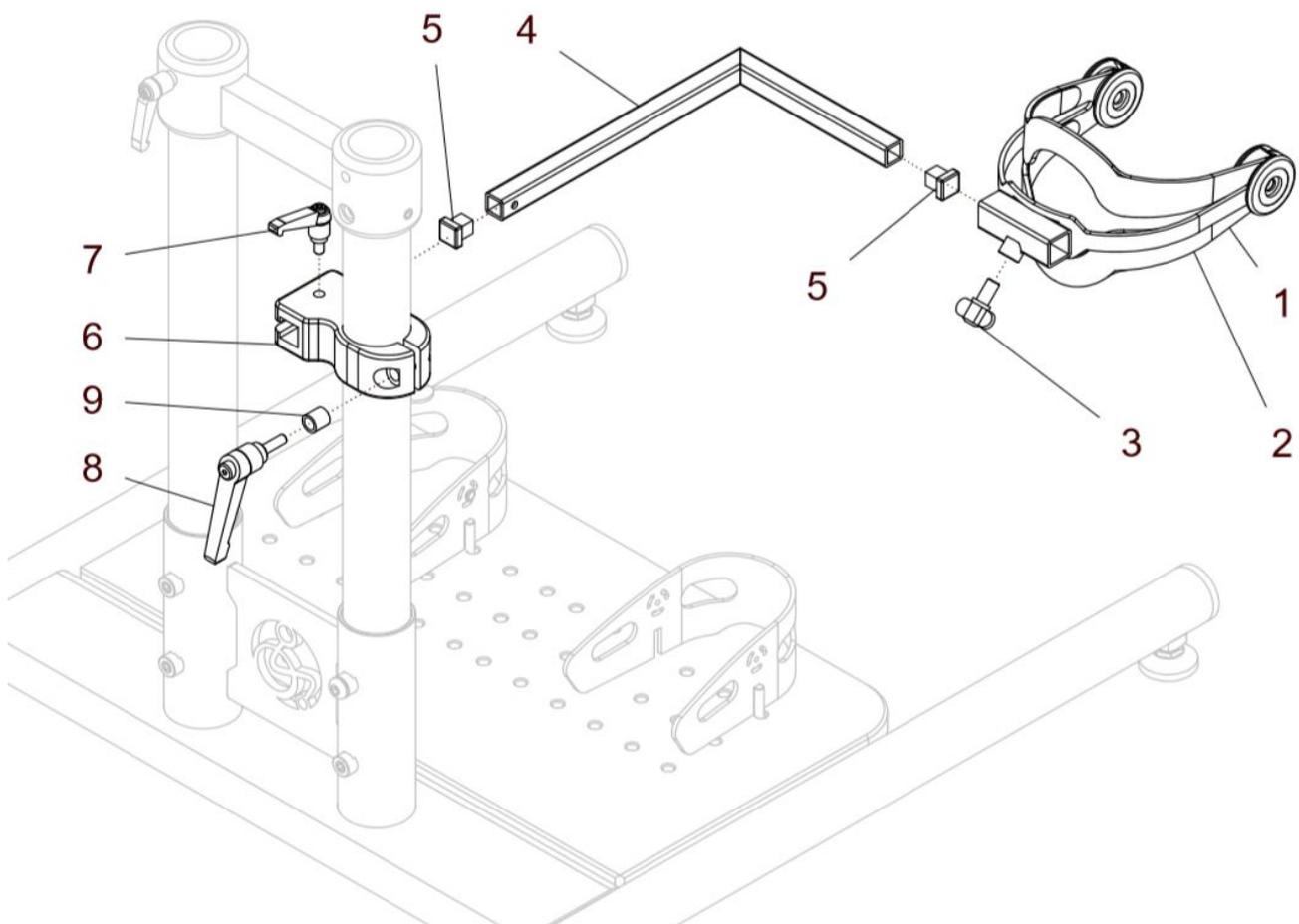

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a – 9	G28 220 10	Kniepelotte SHARK Gr. M mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: M (bis 11cm Kniebreite)	1 Paar
1b, 2b – 9	G28 220 15	Kniepelotte SHARK Gr. S mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: S (bis 8cm Kniebreite)	1 Paar
1a , 2a 3	G28 221 00	Kniepelotte Shark Gr. M mit Bezug	2 St.
1b, 2b 3	G30 221 00	Kniepelotte Shark Gr. S mit Bezug	2 St.
1a	G28 221 10	Kniepelotte SHARK Gr. M (ohne Bezug)	2 St.
1b	G30 221 10	Kniepelotte SHARK Gr. S (ohne Bezug)	2 St.
2a	G28 221 80	Bezug / Abpolsterung für Kniebügel SHARK Gr. M Abpolsterung oben und Abpolsterung unten	2 St.
2b	G30 221 80	Bezug / Abpolsterung für Kniebügel SHARK Gr. S Abpolsterung oben und Abpolsterung unten	2 St.
3	01 191 09	Flügelschraube - M8x15 mini-wing	2 St.
4 – 9	G28 211 00	Kniehalter klein kpl. mit Kniehalterrohr und Klemmhebel	2 St.
4	G28 211 03	Kniehalterrohr 628 L-Form	2 St.
5	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	4 St.
6	G28 211 51	Kniehalter 628	2 St.
7	01 190 08	Klemmhebel - M8x15 klein	2 St.
8	01 190 35	Klemmhebel klein – M8x30	2 St.
9	G28 211 59	Abstandshülse für Klemmhebel	2 St.


Kniepelotte „SHARK“ drehbar

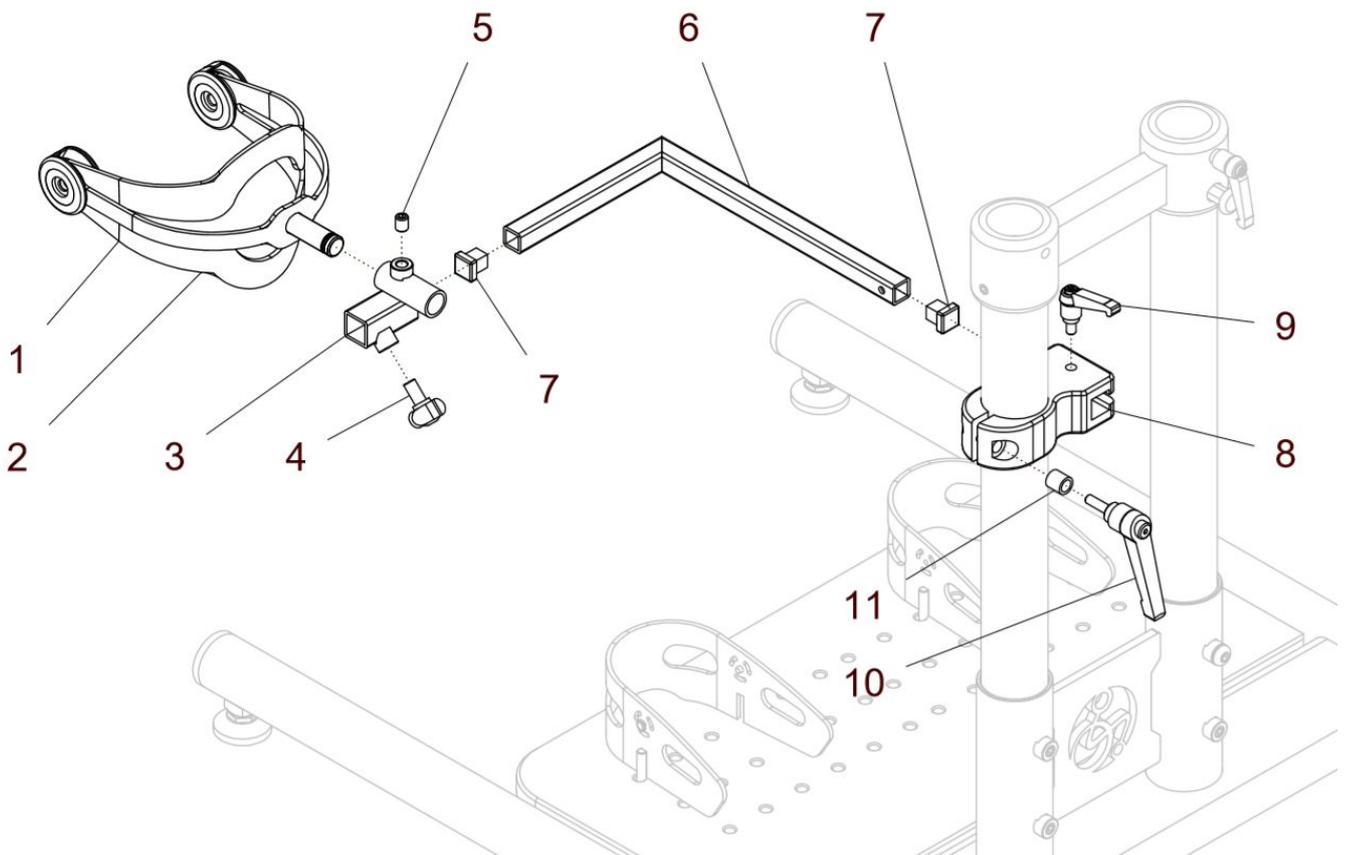

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a, 3 - 11	G28 220 20	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. M mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: M (bis 11cm Kniebreite)	1 Paar
1b, 2b, 3 - 11	G28 220 25	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. S mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: S (bis 8cm Kniebreite)	1 Paar
1a, 2a, 3a - 5	G28 222 52	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. M mit T-Träger rechts kpl. Kniepelotte SHARK mit Bezug drehbar und mit T-Träger rechts Größe: M (bis 11cm Kniebreite)	1 St.
1b, 2b, 3a - 5	G30 222 52	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. S mit T-Träger rechts kpl. Kniepelotte SHARK mit Bezug drehbar und mit T-Träger rechts Größe: S (bis 8cm Kniebreite)	1 St.
1a, 2a, 3b - 5	G28 222 53	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. M mit T-Träger links kpl. Kniepelotte SHARK mit Bezug drehbar und mit T-Träger links Größe: M (bis 11cm Kniebreite)	1 St.
1b, 2b, 3b - 5	G30 222 53	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. S mit T-Träger links kpl. Kniepelotte SHARK mit Bezug drehbar und mit T-Träger links Größe: S (bis 8cm Kniebreite)	1 St.
1a, 2a	G28 222 05	Kniepelotte Shark drehbar Gr. M mit Bezug	2 St.
1b, 2b	G30 222 05	Kniepelotte Shark drehbar Gr. S mit Bezug	2 St.
1a	G28 222 10	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. M (ohne Bezug)	2 St.
1b	G30 222 10	Kniepelotte SHARK drehbar Gr. S (ohne Bezug)	2 St.
2a	G28 221 80	Bezug / Abpolsterung für Kniebügel SHARK Gr. M Abpolsterung oben und Abpolsterung unten	2 St.
2b	G30 221 80	Bezug / Abpolsterung für Kniebügel SHARK Gr. S Abpolsterung oben und Abpolsterung unten	2 St.
3a - 5	G20 222 20	T-Träger rechts für Kniepelotte drehbar kpl. mit Flügelschraube und Gewindestift	1 St.
3b - 5	G20 222 30	T-Träger links für Kniepelotte drehbar kpl. mit Flügelschraube und Gewindestift	1 St.
3a	G20 222 21	T-Träger rechts für Kniepelotte drehbar	1 St.
3b	G20 222 31	T-Träger links für Kniepelotte drehbar	1 St.
4	01 191 09	Flügelschraube - M8x15 mini-wing	2 St.
5	01 131 47S	Gewindestift M8x10 schwarz - DIN 913	2 St.
6 - 11	G28 211 00	Kniehalter klein kpl mit Kniehalterrohr und Klemmhebel	2 St.
6	G28 211 03	Kniehalterrohr 628 L-Form	2 St.
7	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	4 St.
8	G28 211 51	Kniehalter 628	2 St.
9	01 190 08	Klemmhebel - M8x15 klein	2 St.

10	01 190 35	Klemmhebel klein – M8x30	2 St.
11	G28 211 59	Abstandshülse für Klemmhebel	2 St.


Knipelotte standard, drehbar

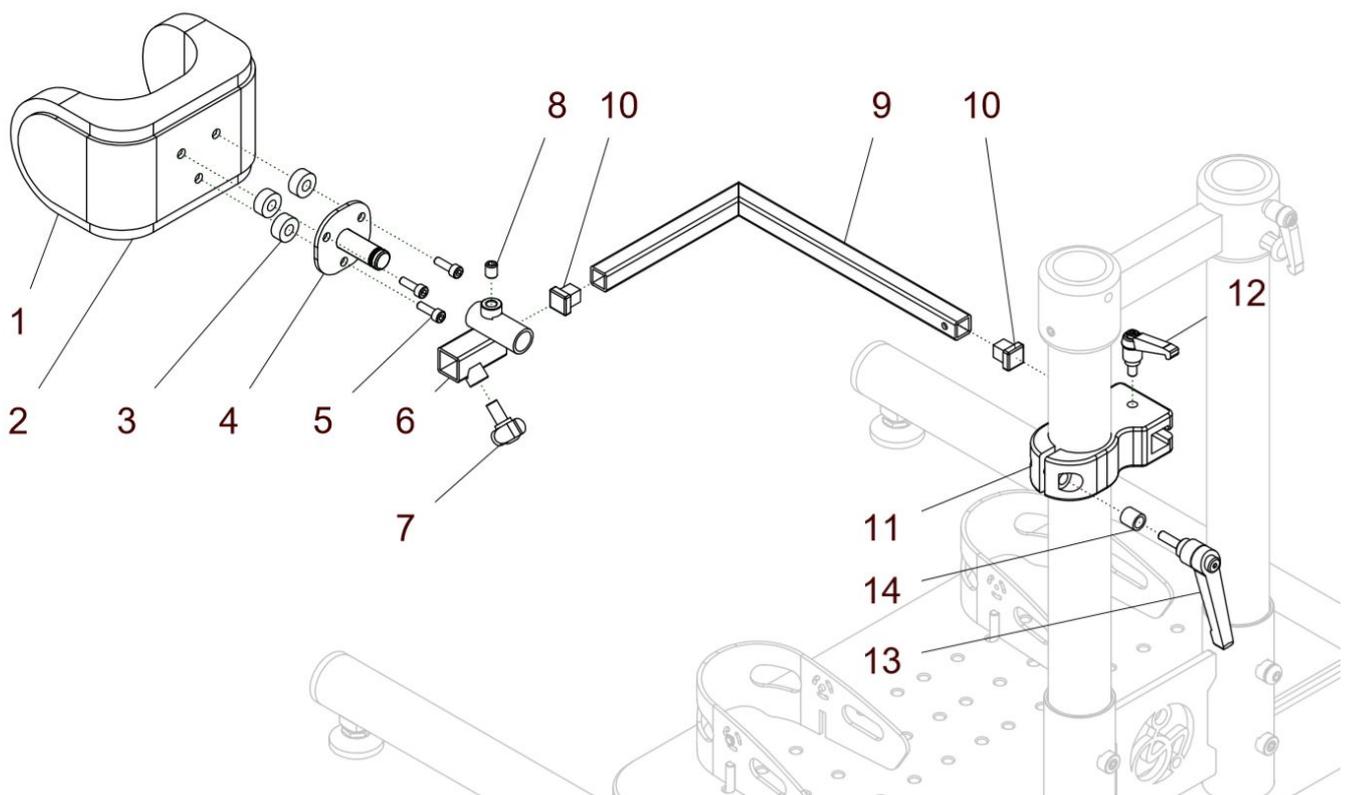



Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a, 3 – 14	G28 210 30	Kniepelotte standard drehbar Gr. M mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: M (bis 11cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1b, 2b, 3 - 14	G28 210 35	Kniepelotte standard drehbar Gr. S mit Kniehalter kpl. und mit Kniehalterrohr Größe: S (bis 8cm Kniebreite) FB: ?	1 Paar
1a, 2a – 5	G28 213 55	Kniepelotte standard drehbar Gr. M mit Bezug FB: ?	2 St.
1b, 2b – 5	G30 213 55	Kniepelotte standard drehbar Gr. S mit Bezug FB: ?	2 St.
1a, 2a, 3	G28 211 60	Kniepelotte standard mit Bezug Gr. M (ohne Halter) FB: ?	2 St.
1b, 2b, 3	G30 211 60	Kniepelotte standard mit Bezug Gr. S (ohne Halter) FB: ?	2 St.
1a	G28 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. M	2 St.
1b	G30 211 90	Kniepelotte standard (ohne Bezug) Gr. S	2 St.
2a	G28 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. M FB: ?	2 St.
2b	G30 211 87	Bezug für Kniepelotte standard Gr. S FB: ?	2 St.
3	01 301 02	Scheibe Kunststoff Ø8,4	6 St.
4	G30 212 02	Halter mit Bolzen für Kniepelotte drehbar	2 St.
5	01 162 07	Zylinderschraube mit Innensechskant - M5x16 – ISO 4762 schwarz	6 St.
6a – 8	G20 222 20	T-Träger rechts für Kniepelotte drehbar kpl. mit Flügelschraube und Gewindestift	1 St.
6b - 8	G20 222 30	T-Träger links für Kniepelotte drehbar kpl. mit Flügelschraube und Gewindestift	1 St.
6a	G20 222 21	T-Träger rechts für Kniepelotte drehbar	1 St.
6b	G20 222 31	T-Träger links für Kniepelotte drehbar	1 St.
7	01 191 09	Flügelschraube - M8x15 mini-wing	2 St.
8	01 131 47S	Gewindestift M8x10 schwarz - DIN 913	2 St.
9 – 14	G28 211 00	Kniehalter klein kpl mit Kniehalterrohr und Klemmhebel	2 St.
9	G28 211 03	Kniehalterrohr 628 L-Form	2 St.
10	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	4 St.
11	G28 211 51	Kniehalter 628	2 St.
12	01 190 08	Klemmhebel - M8x15 klein	2 St.
13	01 190 35	Klemmhebel klein – M8x30	2 St.
14	G28 211 59	Abstandshülse für Klemmhebel	2 St.

Becken

Gruppe 3

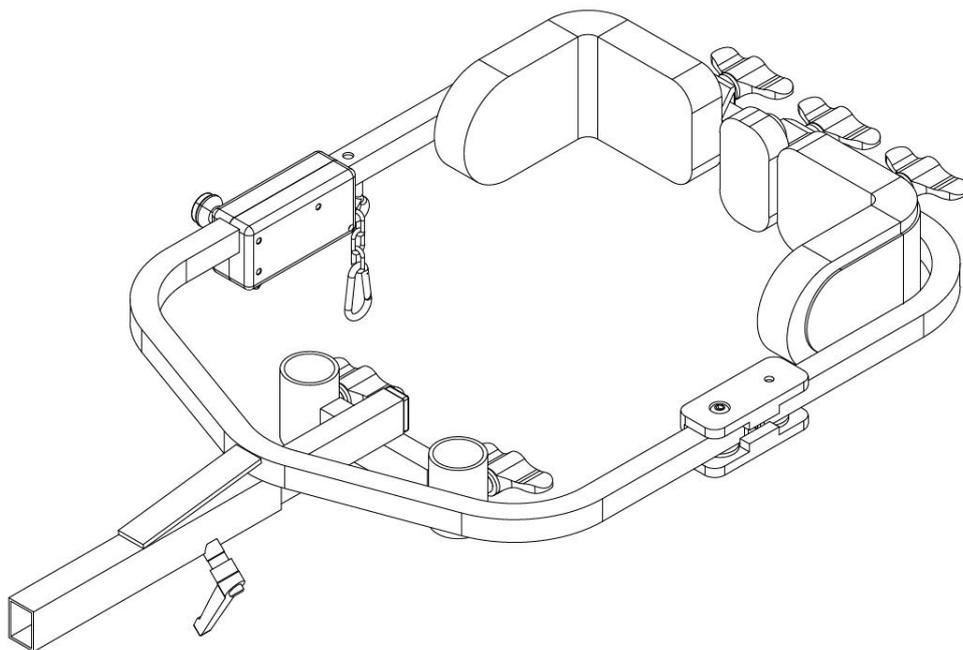


Schwenkbeckenrahmen

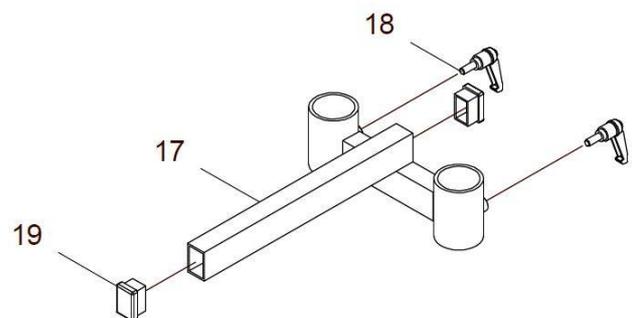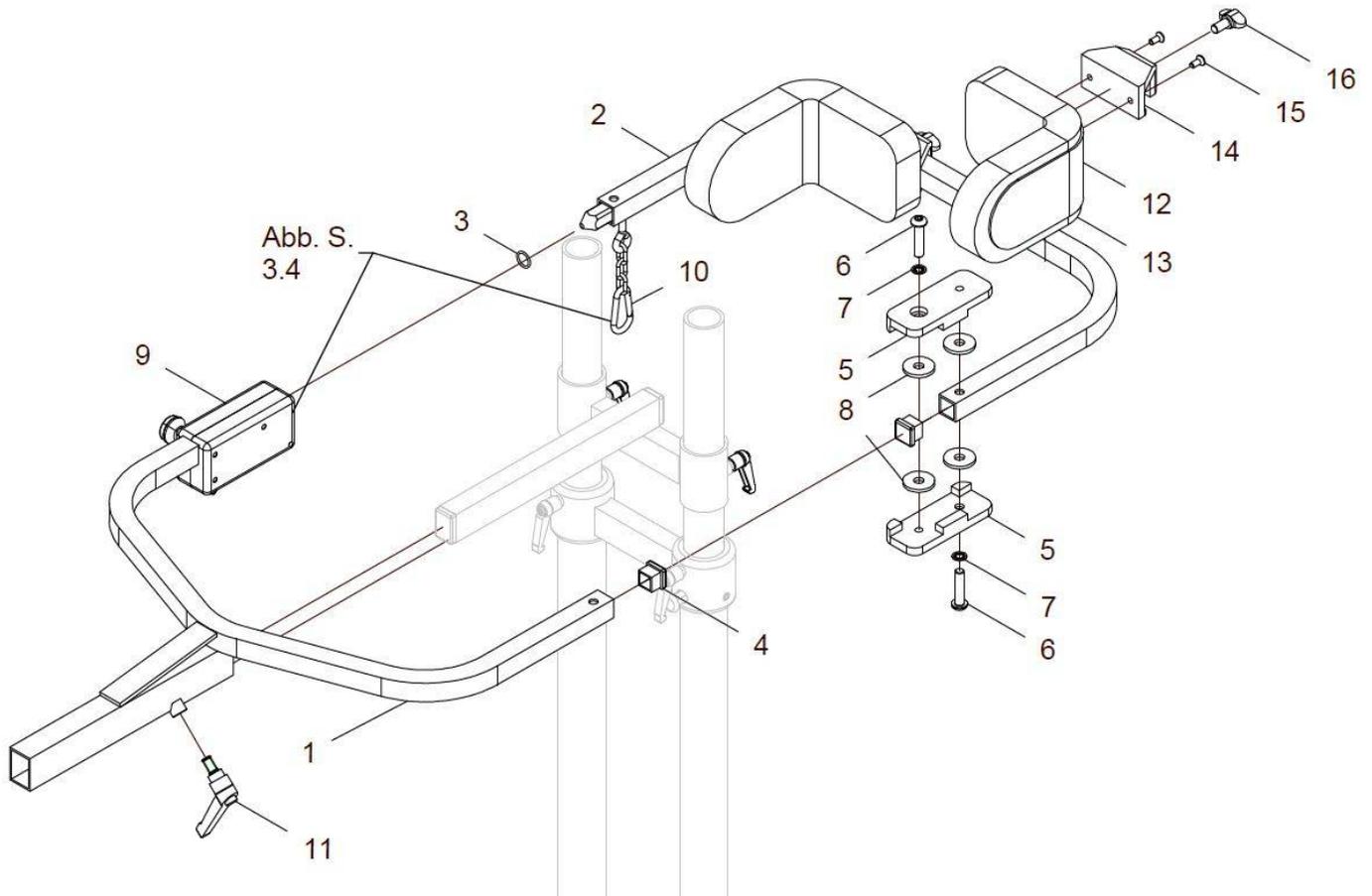


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	G28 340 00	Schwenkbeckenrahmen <u>klein</u> mit Beckenpelotten kpl. (ohne Halter für Beckenrahmen) Größe Beckenpelotten: S, M ? FB: ?	1 St.
1 – 11	G28 341 00	Schwenkbeckenrahmen <u>klein</u> ohne Beckenpelotten kpl. (ohne Beckenpelotten/ ohne Halter für Beckenrahmen)	1 St.
1	G25 341 11	Schwenkbeckenrahmenhalter klein – 400 (vorne)	1 St.
2	G30 341 12	Schwenkbeckenrahmen klein hinten - 400 (T=150mm)	1 St.
3	04 730 12	O-Ring schwarz 12,37x2,62	1 St.
4	04 210 41	Verschlussstopfen 20x20	2 St.
5	G20 341 41	Gelenkplatte	2 St.
6	01 152 42	Linsenschraube mit Innensechskant M8x35 – ISO 7380	2 St.
7	01 330 02	Schnorr-Scheibe NM8	2 St.
8	01 311 03	Scheibe PE groß 8,4 – ISO 7093	4 St.
9	G20 341 30	Verschluss Schwenkbeckenrahmen kpl.	1 St.
10	G20 341 70	Verschlussicherungskette Schwenkbeckenrahmen kpl.	1 St.
11	01 190 00	Klemmhebel groß – M8x15	1 St.
12a, 13a 14 – 16	G28 340 50	Beckenpelotte mit Bezug / mit Halter Gr. M kpl. mit Bezug und Halter für Schwenkbeckenrahmen FB: ?	1 Paar
12b, 13b 14 – 16	G30 340 50	Beckenpelotte mit Bezug / mit Halter Gr. S kpl. mit Bezug und Halter für Schwenkbeckenrahmen FB: ?	1 Paar
12a – 13a	G28 310 90	Beckenpelotte mit Bezug (ohne Halter) Gr. M FB: ?	2 St.
12b – 13b	G30 310 90	Beckenpelotte mit Bezug (ohne Halter) Gr. S FB: ?	2 St.
12a	G28 311 90	Beckenpelotte (ohne Bezug) Gr. M	2 St.
12b	G30 311 90	Beckenpelotte (ohne Bezug) Gr. S	2 St.
13a	G28 311 87	Bezug für Beckenpelotte Gr. M FB: ?	2 St.
13b	G30 311 87	Bezug für Beckenpelotte Gr. S FB: ?	2 St.
14	G20 341 01	Halter für Beckenpelotte	2 St.
15	01 120 03	Senkschraube mit Innensechskant M5x16 – ISO 10642	4 St.
16	01 191 09	Flügelschraube mini-wing M8x15	2 St.
17 – 19	G28 310 50	Halter oben 35 für Beckenrahmen (oben) kpl. mit Flügelschraube für Montage an Mittelsäulenrohr 35mm	1 St.
17	G28 310 51	Halter mini für Schwenkbeckenrahmen	1 St.
18	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
19	04 210 35	Verschlussstopfen 30x20	2 St.

Verschluss Schwenkbeckenrahmen

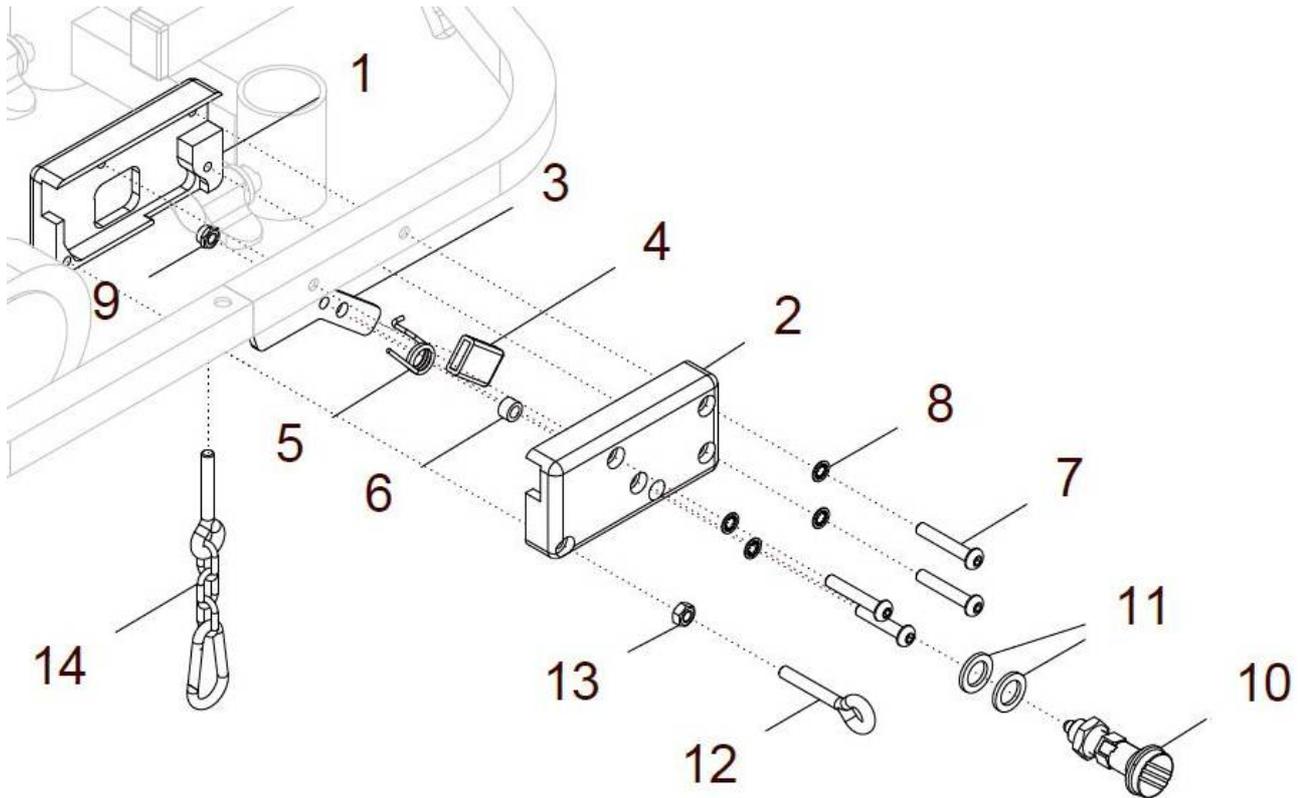

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	G20 341 30	Verschluss Schwenkbeckenrahmen kpl. Verschlussgehäuse mit Riegel, Schenkelfeder und Arretierbolzen	1 St.
1	G20 341 37	Verschlussgehäuse links	1 St.
2	G20 341 36	Verschlussgehäuse rechts	1 St.
3	G20 341 32	Riegel	1 St.
4	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
5	02 310 16	Schenkelfeder Verriegelung	1 St.
6	G20 341 34	Distanzbuchse Verschluss Schwenkbeckenrahmen	1 St.
7	01 152 25	Linsenkopfschraube mit Innensechskant – M6x35 – ISO 7380	4 St.
8	01 330 01	Schnorr-Scheibe - NM6	4 St.
9	01 210 03	Mutter – M6 – DIN 985	1 St.
10	01 133 05	Arretierbolzen - M12x1,5	1 St.
11	01 321 35	Scheibe – 13 – ISO 7092	2 St.
12	01 181 10	Ringschraube – M6x40	1 St.
13	01 210 13	Mutter – M6 – DIN 934	1 St.
14	G20 341 70	Verschlusssicherung Schwenkbeckenrahmen kpl. Karabiner mit Kette, Augenschraube M6x25 und mit Mutter M6	1 St.


Beckenzusatzpelotte für Schwenkbeckenrahmen

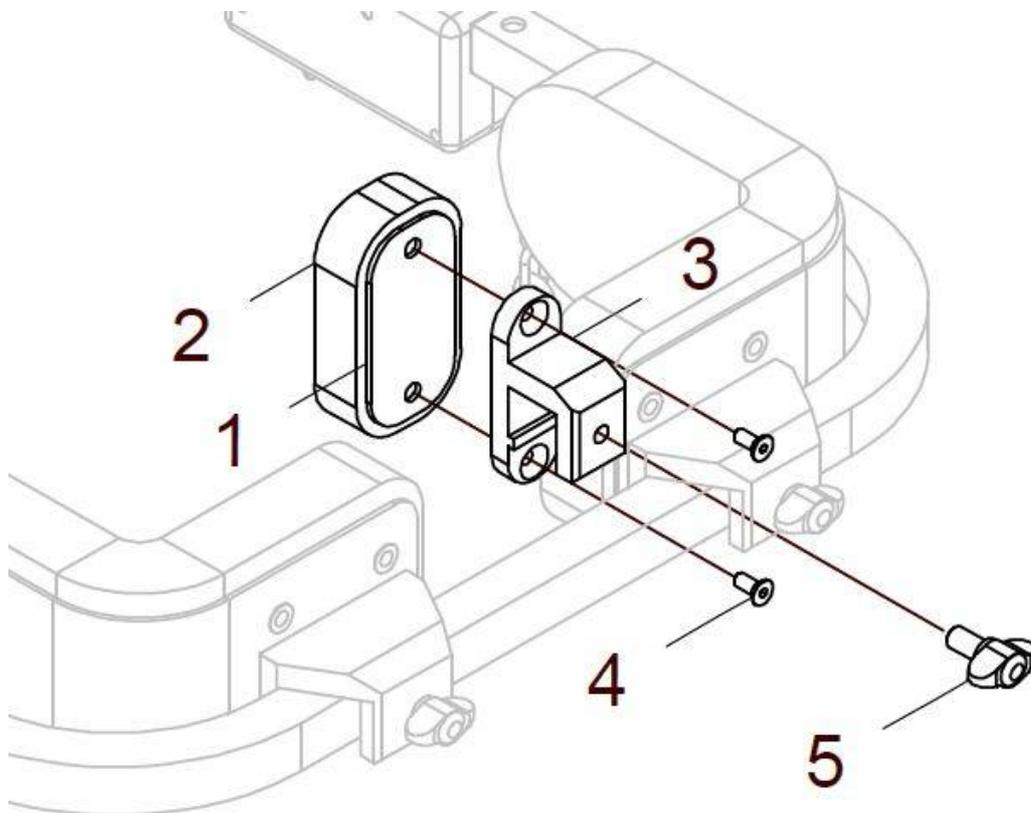


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	G28 343 00	Beckenzusatzpelotte Gr. 50 für Schwenkbeckenrahmen kpl. für Beckenpelotten Gr. S / M mit Halter für Beckenpelotte auf Schwenkbeckenrahmen FB: ?	1 St.
1 – 2	G28 343 60	Beckenzusatzpelotte Gr. 50 (ohne Halter) kpl. für Beckenpelotten Gr. S / M FB: ?	1 St.
1	G28 343 90	Beckenzusatzpelotte (ohne Bezug) Gr. 50	1 St.
2	G28 343 81	Bezug für Beckenzusatzpelotte Gr. 50 FB: ?	1 St.
3	G28 343 11	Halter schmal für Beckenzwischenpelotte	1 St.
4	01 120 03	Senkschraube mit Innensechskant – M5x16 – DIN 7991	2 St.
5	01 191 09	Flügelschraube mini-wing M8x15	1 St.

Rücken

Gruppe 4

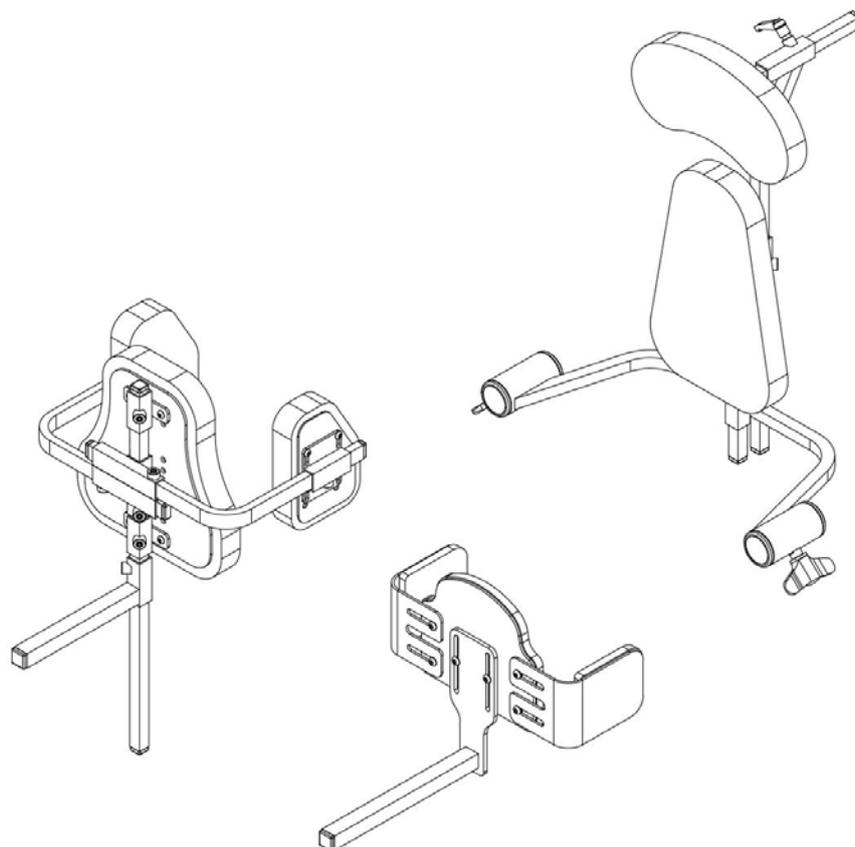


Brustpelotte mini

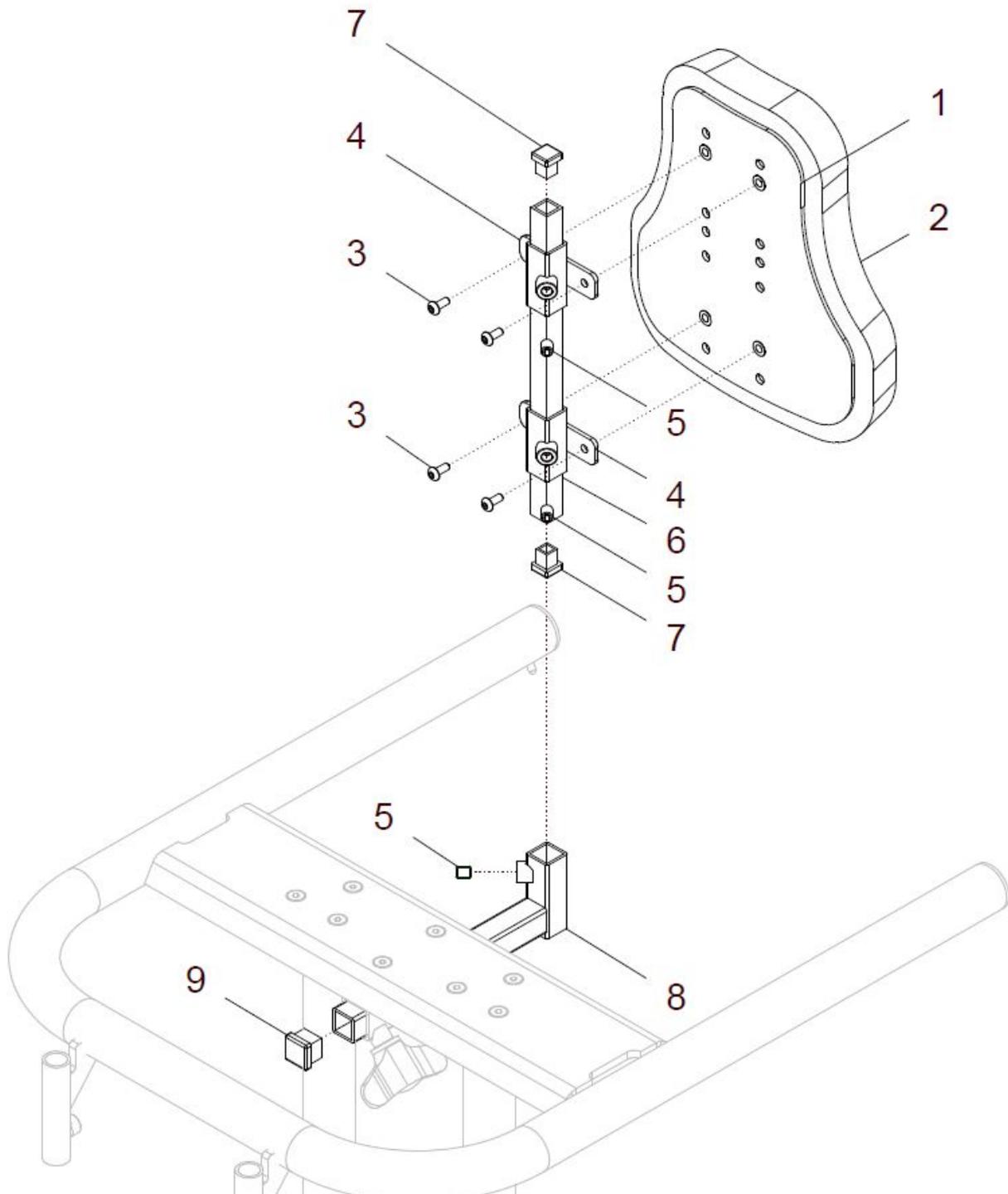


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	G28 410 00	Brustpelotte mini kpl. Halterung unter Tischrahmen FB: ?	1 St.
1 - 2	G28 410 20	Brustpelotte mini mit Bezug ohne Halterung FB: ?	1 St.
1	G28 411 90	Brustpelotte mini (ohne Bezug)	1 St.
2	G28 411 81	Bezug für Brustpelotte mini FB: ?	1 St.
3	01 152 03	Linsenkopfschrauben mit Innensechskant – M5x16 – ISO 7380	4 St.
4 - 9	G28 411 50	Brustpelottenhalterung vormontiert kpl. (ohne Brustpelotte)	1 St.
4	G20 422 01	Halter für Brustpelotte	2 St.
5	01 131 47S	Gewindestift – M8x10 schwarz – DIN 913	3 St.
6	G30 422 21	Stange L=250 für Brustpelotte mini	1 St.
7	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
8	G28 411 21	Brustpelottenhalter mini T-Stück	1 St.
9	04 210 41	Verschlussstopfen 20x20	1 St.

Seitenführungspelotten an Brustpelotte mini montiert

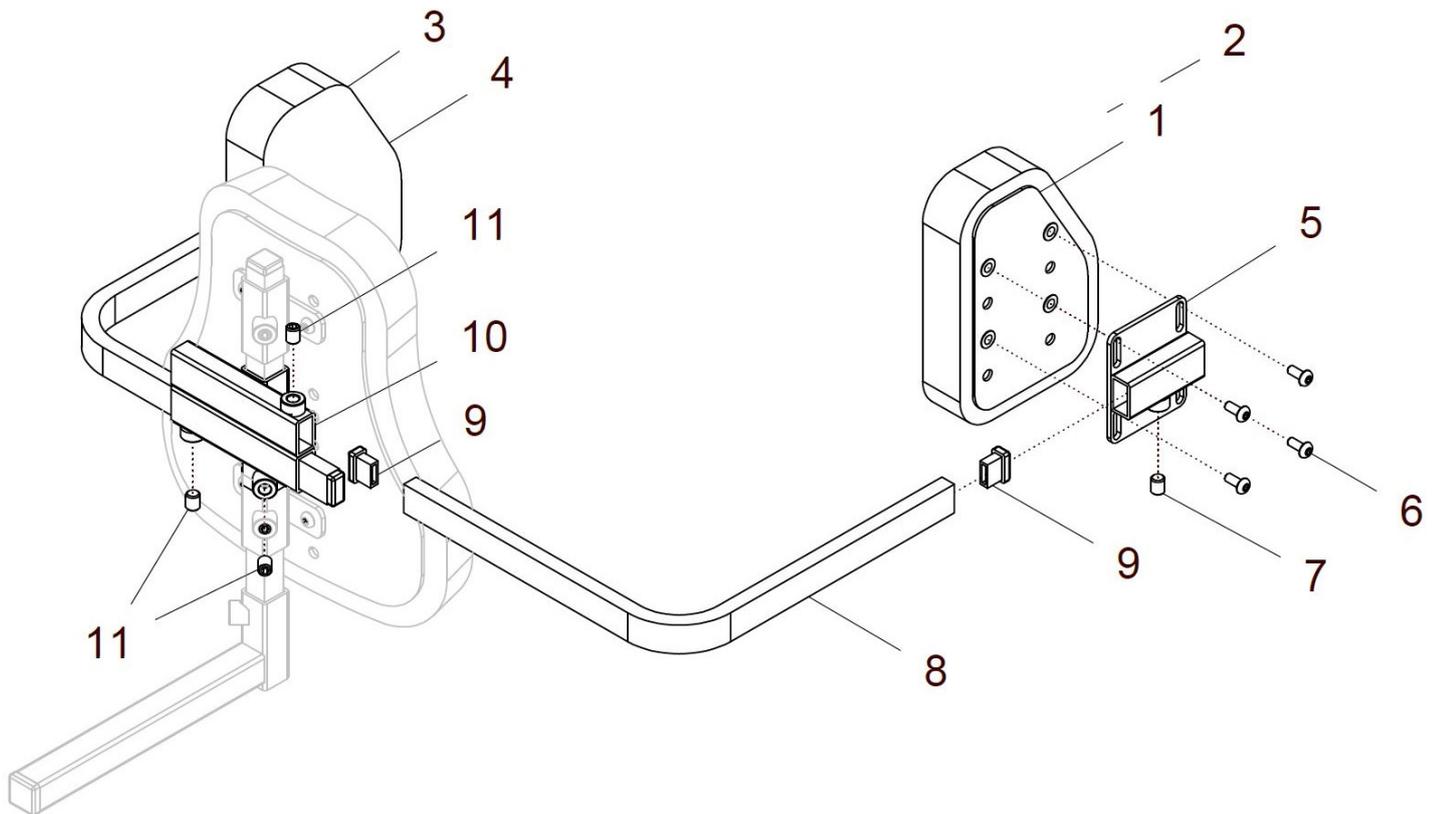


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 2c, 3c, 4c, 5 - 11	G28 401 00	Seitenführungspelotten mini kpl. mit Bezug und mit Halterung an Brustpelotte FB: ?	1 Paar
1, 2, 5 - 9	G28 403 10	Seitenführungspelotte links mini kpl. mit Halter und Bügel FB: ?	1 St.
1, 2, 5 - 7	G28 403 20	Seitenführungspelotte links mini mit Bezug und mit Seitenpelottenhalter (ohne Bügel) FB: ?	1 St.
1	G28 403 90	Seitenpelotte mini links (ohne Bezug)	1 St.
2	G28 403 81	Bezug für Seitenpelotte mini links FB: ?	1 St.
3, 4, 5 - 9	G28 402 10	Seitenführungspelotte rechts mini kpl. mit Halter und Bügel FB: ?	1 St.
3, 4, 5 - 7	G28 402 20	Seitenführungspelotte rechts mini mit Bezug und mit Seitenpelottenhalter (ohne Bügel) FB: ?	1 St.
3	G28 402 90	Seitenpelotte mini rechts (ohne Bezug)	1 St.
4	G28 402 81	Bezug für Seitenpelotte mini rechts FB: ?	1 St.
5	G28 401 03	Seitenpelottenhalter	2 St.
6	01 152 02	Linsenkopfschraube mit Innensechskant – M5x12 – ISO 7380	8 St.
7	01 131 47S	Gewindestift – M8x10 schwarz – DIN 913	2 St.
8	G28 401 02	Seitenpelottenhalter gebogen klein	2 St.
9	04 210 30	Verschlussstopfen - 20x10 schwarz	4 St.
10 - 11	G20 401 50	Seitenpelottenhalterung an Brustpelotte (ohne Seitenpelotten / ohne Bogen)	1 St.
10	G20 401 51	Halter verstellbar für Seitenpelotten	1 St.
11	01 131 47S	Gewindestift – M8x10 schwarz – DIN 913	3 St.

Brustpelotte mit integrierten Seitenpelotten an Tischrahmen

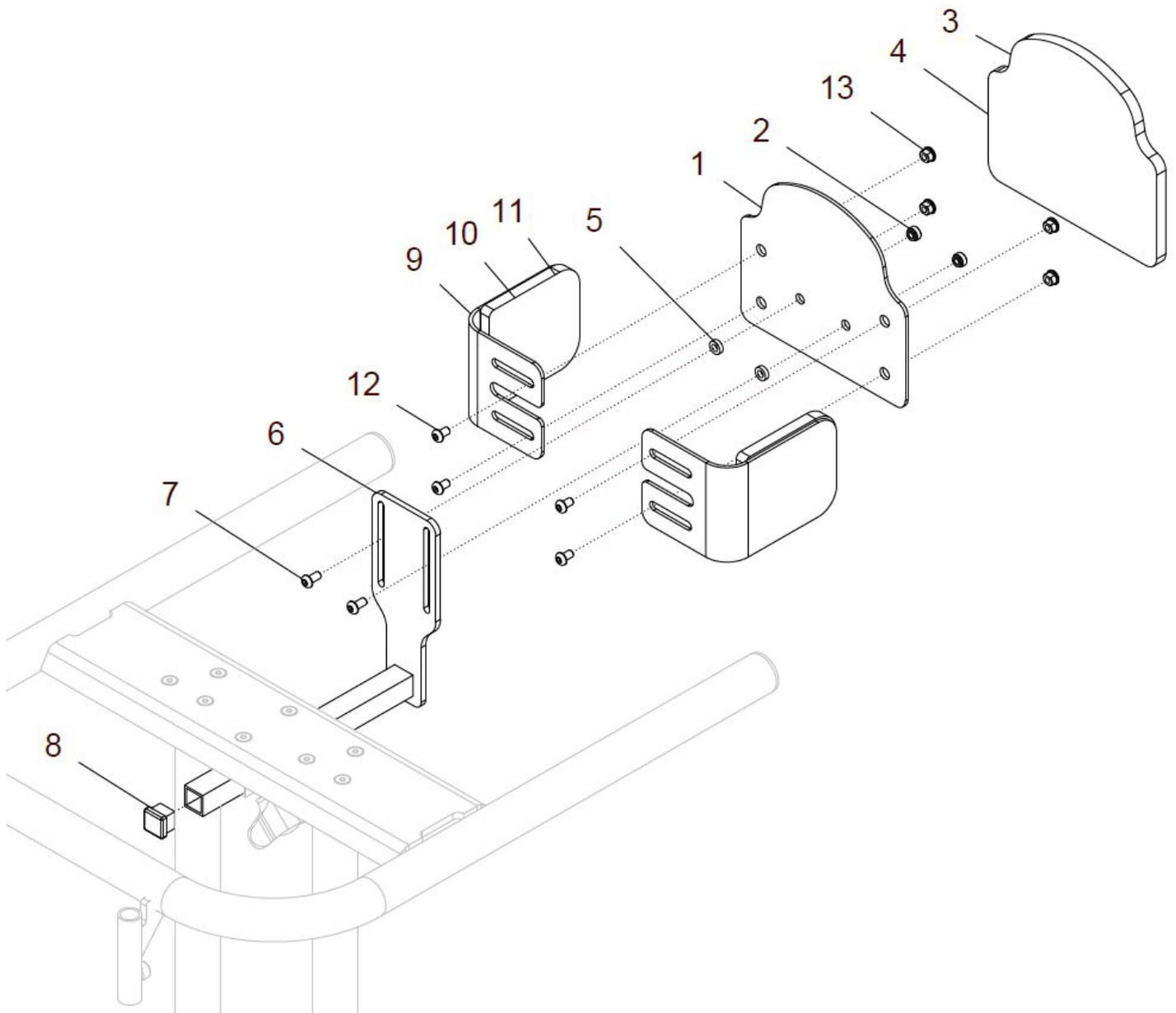

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	G28 415 50	Brustpelotte mit integrierten Seitenpelotten Gr. M kpl. mit integrierten Seitenpelotten und mit Halterung am <u>Tischrahmen</u> Gr.: M (Breite zwischen den Seitenpelotten 20 – 28cm) FB: ?	1 St.
1 - 8	G28 415 60	Brustpelotte und Halter Gr. M kpl. mit Halterung am <u>Tischrahmen</u> (ohne integrierte Seitenpelotten) FB: ?	1 St.
1 - 4	G28 415 15	Brustpelotte (ohne Halter) Gr. M kpl. (ohne Halter / ohne integrierte Seitenpelotten) FB: ?	1 St.
1	G28 415 12	Brustpelotte Gr. M (ohne Bezug)	1 St.
2	01 243 03	Einpressmutter M6	2 St.
3	G28 415 81	Bezug für Brustpelotte Gr. M	1 St.
4	G28 415 19	Polster für Brustpelotte Gr. M	1 St.
5	G28 415 23	Distanzbuchse 3,5mm	2 St.
6	G28 415 42	Brustpelottenhalter 628 für Brustpelotte integriert	1 St.
7	01 156 66	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x16 ISO 7380F schwarz	2 St.
8	04 210 41	Verschlussstopfen – 20x20	1 St.
9 - 13	G28 415 20	Seitenpelotte mit Bezug Gr. S / M kpl. mit Gewindebolzen und Schrauben FB: ?	2 St.
9 + 10	G28 415 25	Blech Seitenpelotte mit Polster Gr. S / M (ohne Bezug)	2 St.
11	G28 415 82	Bezug für Seitenpelotte Gr. S / M FB: ?	2 St.
12	01 156 62	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x8 ISO 7380F schwarz	4 St.
13	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.

Brustpelotte mit integrierten Seitenpelotten versetzt an Tischrahmen

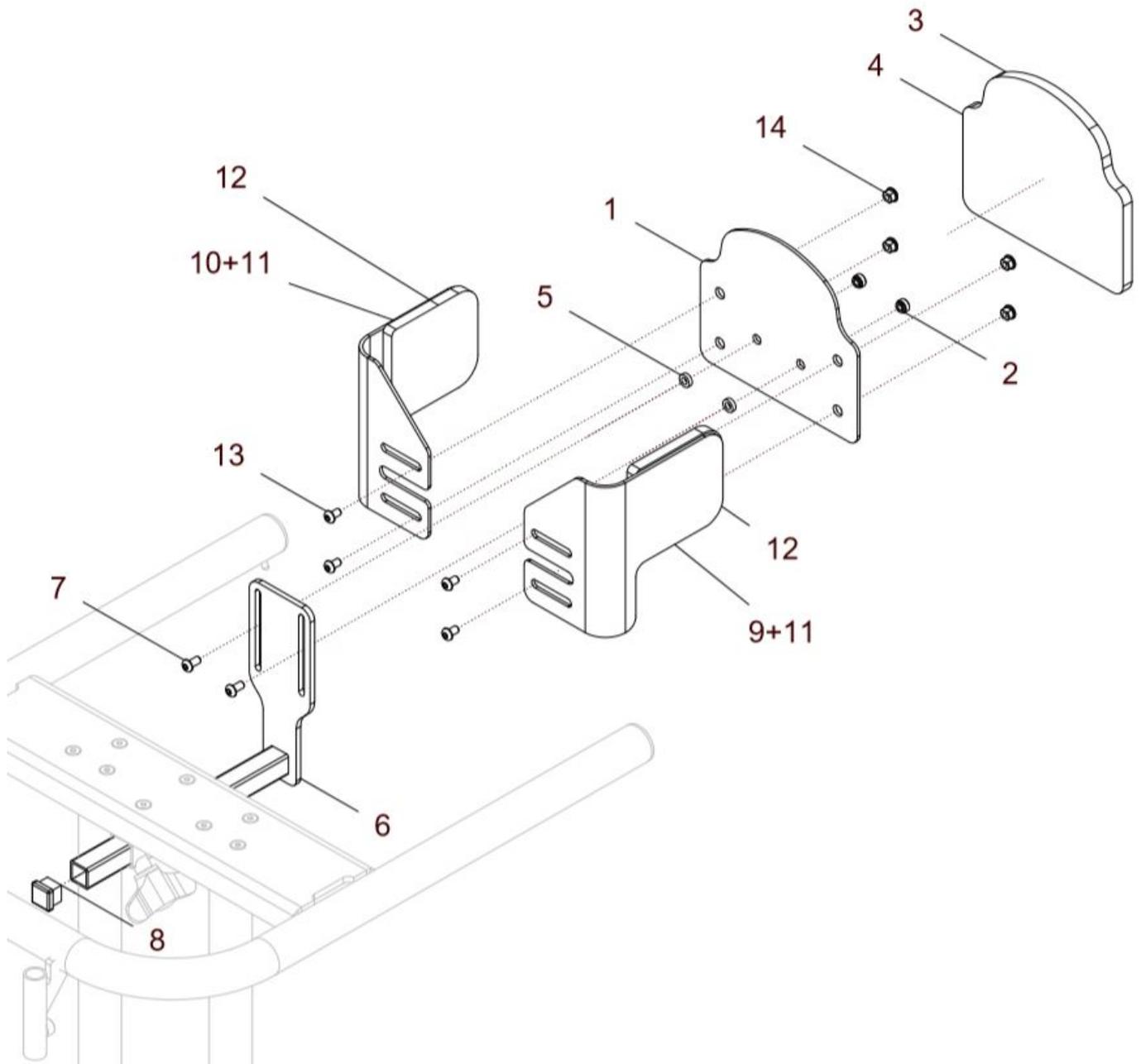


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	G28 416 00	Brustpelotte mit integrierten Seitenpelotten versetzt Gr. M kpl. mit integrierten versetzten Seitenpelotten und mit Halterung am Tischrahmen Seitenpelotten sind um 6cm versetzt nach oben Gr.: M (Breite zwischen den Seitenpelotten 20 – 28cm) FB: ?	1 St.
1 - 8	G28 415 60	Brustpelotte und Halter Gr. M kpl. mit Halterung am <u>Tischrahmen</u> (ohne integrierte Seitenpelotten versetzt nach oben) FB: ?	1 St.
1 - 4	G28 415 15	Brustpelotte (ohne Halter) Gr. M kpl. (ohne Halter / ohne integrierte Seitenpelotten versetzt) FB: ?	1 St.
1	G28 415 12	Brustpelotte Gr. M (ohne Bezug)	1 St.
2	01 243 03	Einpressmutter M6	2 St.
3	G28 415 81	Bezug für Brustpelotte Gr. M	1 St.
4	G28 415 19	Polster für Brustpelotte Gr. M	1 St.
5	G28 415 23	Distanzbuchse 3,5mm	2 St.
6	G28 415 42	Brustpelottenhalter 628 für Brustpelotte integriert	1 St.
7	01 156 66	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x16 ISO 7380F schwarz	2 St.
8	04 210 41	Verschlussstopfen – 20x20	1 St.
9 - 14	G28 416 10	Seitenpelotten versetzt mit Bezug Gr. S / M kpl. Seitenpelotten versetzt rechts und links mit Gewindebolzen und Schrauben (versetzt um 60mm nach oben) FB: ?	1 Paar
9 +11, 12 - 14	G28 416 20	Seitenpelotte versetzt rechts mit Bezug Gr. S / M kpl. Seitenpelotte versetzt rechts mit Gewindebolzen und Schrauben; versetzt um 60mm nach oben FB: ?	1 St.
9 + 11	G28 416 25	Blech Seitenpelotte versetzt rechts mit Polster Gr. S/M (ohne Bezug) versetzt um 60mm nach oben	1 St.
10 +11, 12 - 14	G28 416 30	Seitenpelotte versetzt links mit Bezug Gr. S / M kpl. Seitenpelotte versetzt links mit Gewindebolzen und Schrauben; versetzt um 60mm nach oben FB: ?	1 St.
10 + 11	G28 416 35	Blech Seitenpelotte versetzt links mit Polster Gr. S / M (ohne Bezug) versetzt um 60mm nach oben	1 St.
12	G28 415 82	Bezug für Seitenpelotte Gr. S / M FB: ?	2 St.
13	01 156 62	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x8 ISO 7380F schwarz	4 St.
14	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.

Hinweis:


Wenn die versetzten Seitenpelotten von rechts nach links vertauscht werden, sind die Seitenpelotten nach unten versetzt.

Brustpelotte hoch mit integrierten Seitenpelotten an Tischrahmen
(CODE 6243-H)

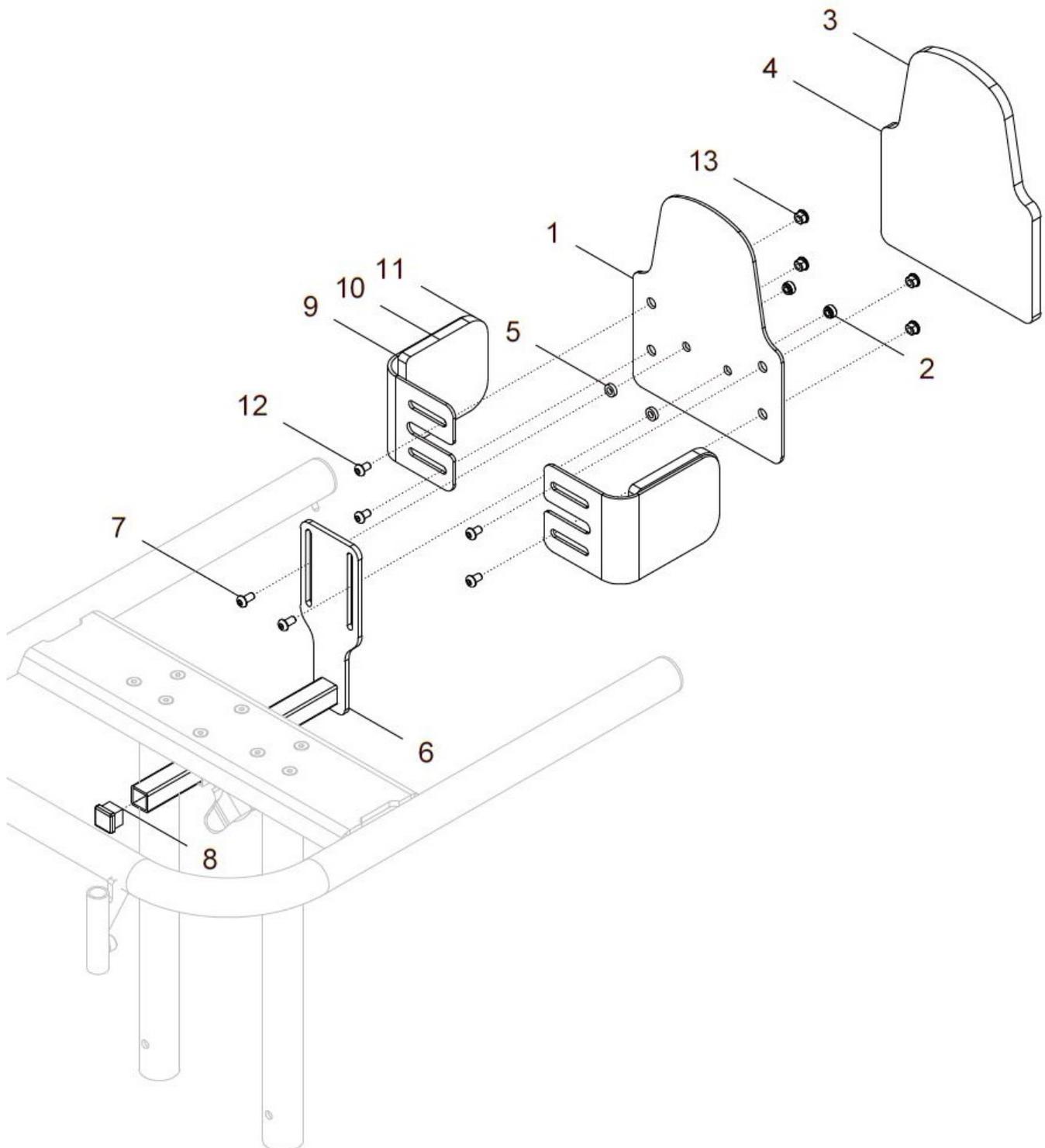


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	G28 418 00	Brustpelotte hoch mit integrierten Seitenpelotten Gr. M kpl. mit integrierten Seitenpelotten und mit Halterung am <u>Tischrahmen</u> Gr.: M (Breite zwischen den Seitenpelotten 20 – 28cm) FB: ?	1 St.
1 - 8	G28 418 60	Brustpelotte hoch und Halter Gr. M kpl. mit Halterung am <u>Tischrahmen</u> (ohne integrierte Seitenpelotten) FB: ?	1 St.
1 - 4	G28 418 15	Brustpelotte hoch (ohne Halter) Gr. M kpl. (ohne Halter / ohne integrierte Seitenpelotten) FB: ?	1 St.
1	G28 418 12	Blech für Brustpelotte hoch Gr. M (ohne Bezug)	1 St.
2	01 243 03	Einpressmutter M6	2 St.
3	G28 418 81	Bezug für Brustpelotte hoch Gr. M	1 St.
4	G28 418 19	Polster für Brustpelotte hoch Gr. M	1 St.
5	G28 415 23	Distanzbuchse 3,5mm	2 St.
6	G28 415 42	Brustpelottenhalter 628 für Brustpelotte integriert	1 St.
7	01 156 66	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x16 ISO 7380F schwarz	2 St.
8	04 210 41	Verschlussstopfen – 20x20	1 St.
9 - 13	G28 415 20	Seitenpelotte mit Bezug Gr. S / M kpl. mit Gewindebolzen und Schrauben FB: ?	2 St.
9 + 10	G28 415 25	Blech Seitenpelotte mit Polster Gr. S / M (ohne Bezug)	2 St.
11	G28 415 82	Bezug für Seitenpelotte Gr. S / M FB: ?	2 St.
12	01 156 62	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x8 ISO 7380F schwarz	4 St.
13	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.

Rückenpelotte auf Tischrahmen

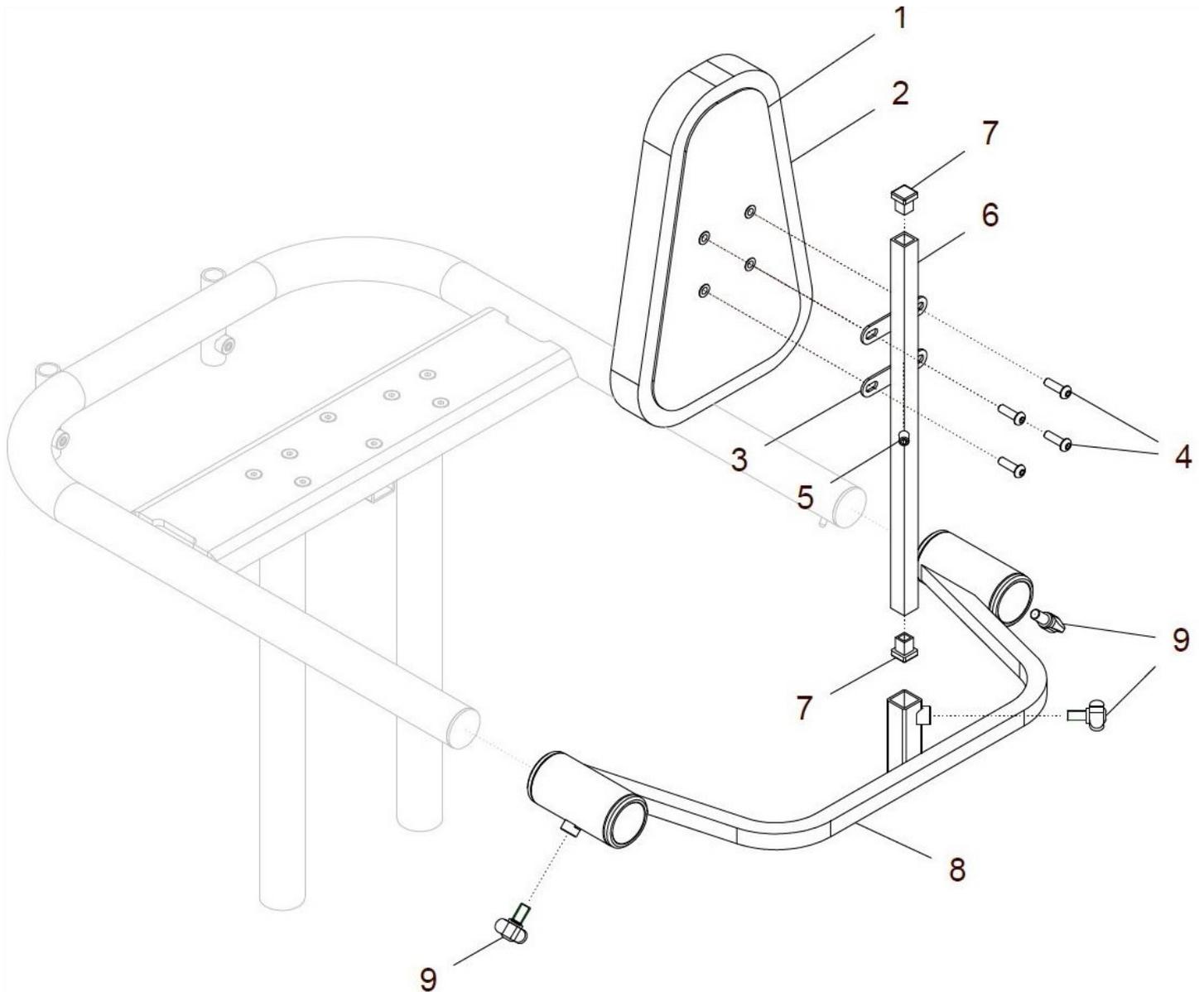


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	G28 420 00	Rückenpelotte mini auf Tischrahmen kpl. mit Halter auf Tischrahmen FB: ?	1 St.
1 – 5	G28 420 50	Rückenpelotte mini mit Bezug mit UNI-Halter FB: ?	1 St.
1	G28 421 90	Rückenpelotte mini (ohne Bezug)	1 St.
2	G28 421 81	Bezug für Rückenpelotte mini FB: ?	1 St.
3	09 990 39	UNI-Halter gerade / normal schwarz	1 St.
4	01 156 54	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M5x12 – ISO 7380F schwarz	4 St.
5	01 131 47S	Gewindestift M8x10 schwarz – DIN 913	1 St.
6	G20 421 21	Stange für Rückenpelotte L=350	1 St.
7	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
8 – 9	G28 421 00	Halter für Rückenpelotte auf Tischrahmen kpl. mit Gleitbuchsen und Klemmhebel	1 St.
8	G28 421 05	Halter mini für Rückenpelotte mit Buchsen	1 St.
9	01 191 09	Flügelschraube mini-wing M8x15	3 St.

Rückenpelotte auf Schwenkbeckenrahmen

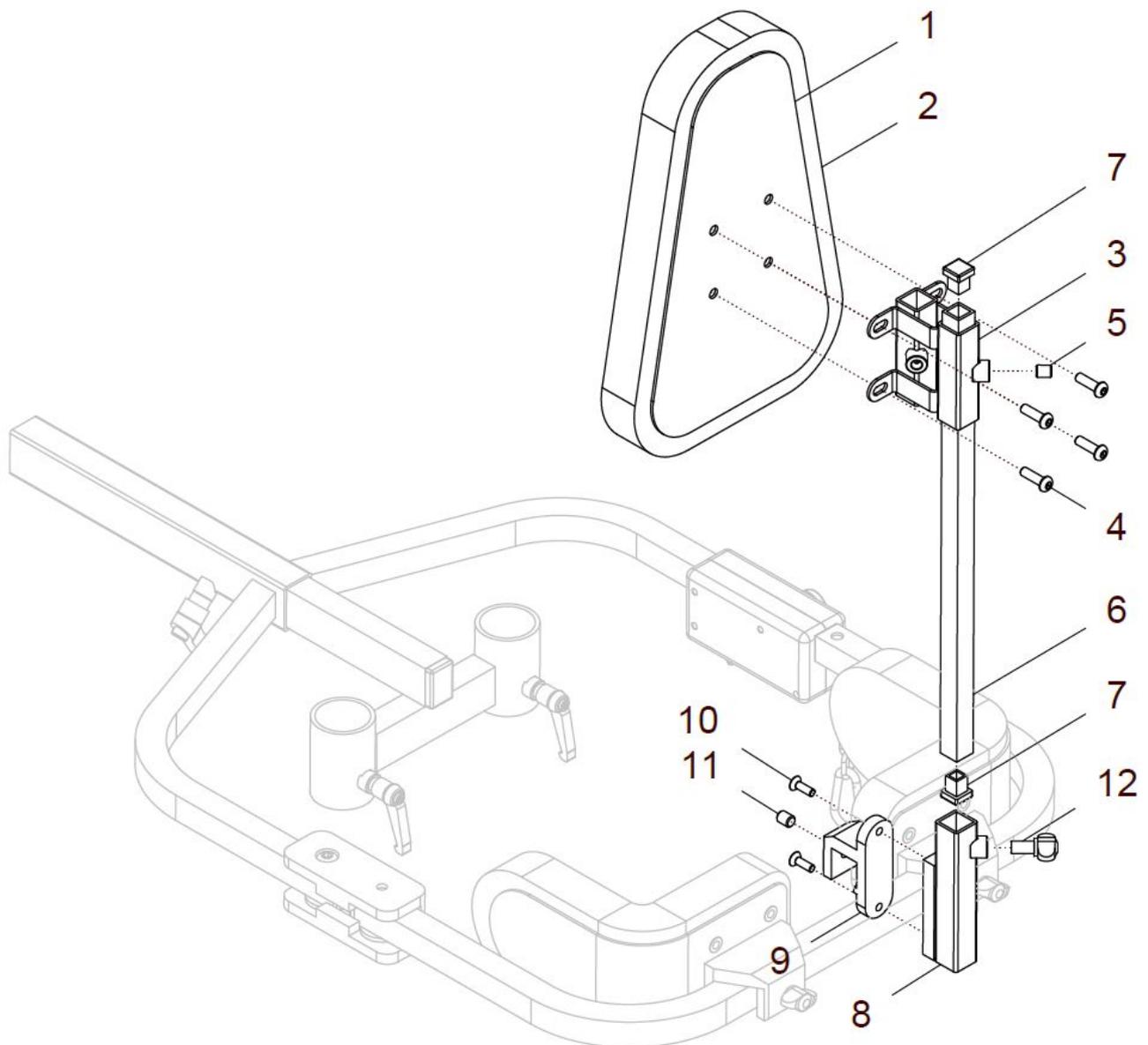


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	G28 420 20	Rückenpelotte mini auf Schwenkbeckenrahmen kpl. mit Halter auf Schwenkbeckenrahmen FB: ?	1 St.
1 – 5	G28 422 50	Rückenpelotte mini mit Bezug mit Doppel-UNI-Halter FB: ?	1 St.
1	G28 421 90	Rückenpelotte mini (ohne Bezug)	1 St.
2	G28 421 81	Bezug für Rückenpelotte mini FB: ?	1 St.
3	G20 422 21	Halter Rückenpelotte und Aufnahme Kopfstütze (Doppel-UNI-Halter)	1 St.
4	01 156 54	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M5x12 – ISO 7380F schwarz	4 St.
5	01 131 47S	Gewindestift M8x10 schwarz – DIN 913	1 St.
6	G20 421 21	Stange für Rückenpelotte L=350	1 St.
7	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
8 – 12	G28 422 10	Halter für Rückenpelotte auf Schwenkbeckenrahmen kpl.	1 St.
8	G28 344 11	Pelottenhalter Aufnahmerohr	1 St.
9	G28 343 11	Halter schmal für Beckenzwischenpelotte	1 St.
10	01 120 03	Senkschraube mit Innensechskant M5x16 – DIN 7991	2 St.
11	01 131 47S	Gewindestift M8x10 schwarz – DIN 913	1 St.
12	01 191 09	Flügelschraube mini-wing M8x15	1 St.

Kopfstütze

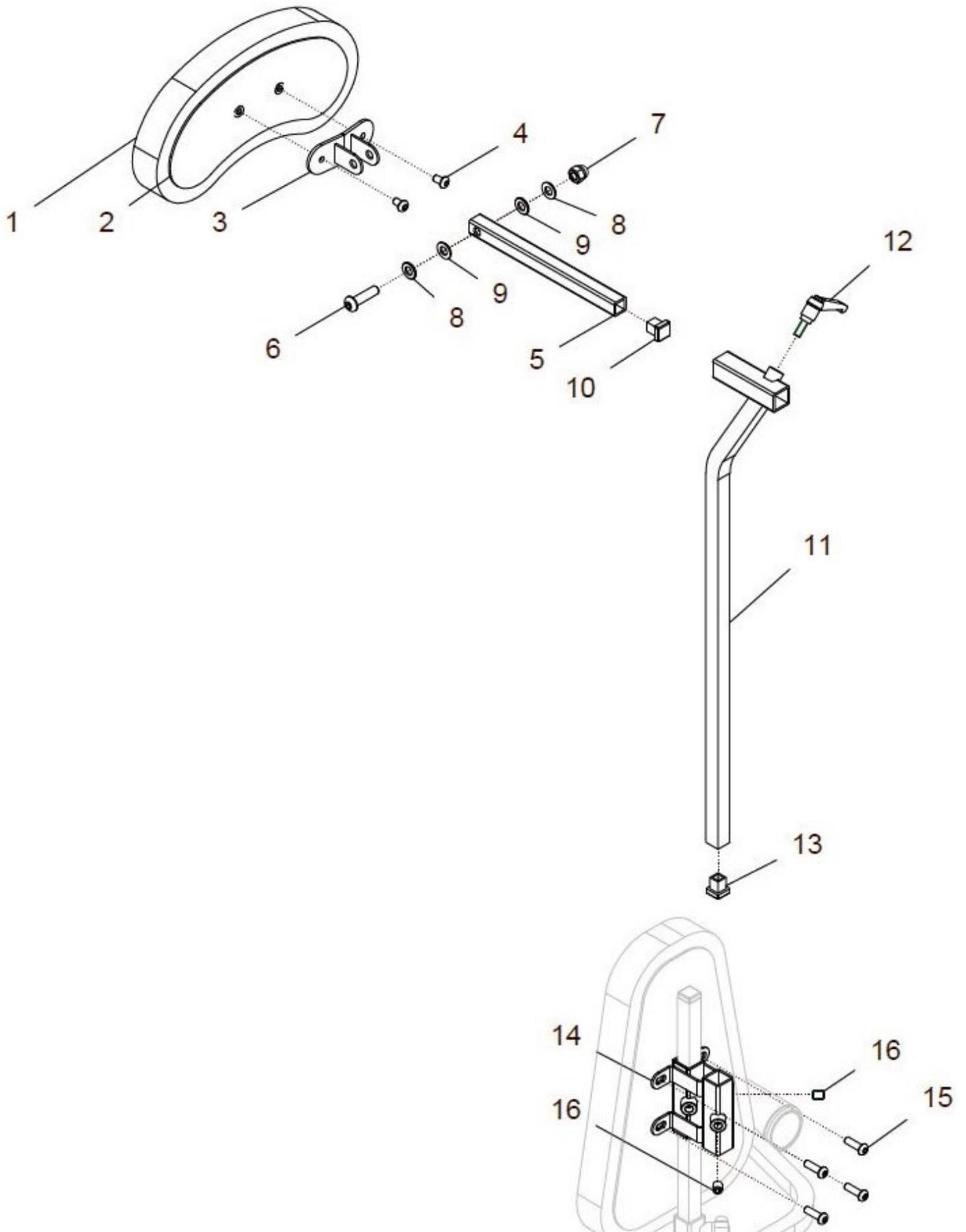

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	G28 460 00	Kopfstütze standard (mini) auf Rückenpelotte kpl. mit Bezug, Kopfstützenhalter und Gestänge FB: ?	1 St.
1 - 4	G28 461 50	Kopfpelotte mini mit Bezug und Halter	1 St.
1	20 262 52	Kopfpelotte / Kopfstütze mini (ohne Bezug)	1 St.
2	G28 461 81	Bezug für Kopfpelotte mini FB: ?	1 St.
3	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
4	01 152 02	Linsenschraube mit Innensechskant M5x12 – ISO 7380 A2	2 St.
5	09 990 74	Kopfstützenhalterstück starr L=180	1 St.
6	01 154 42	Linsenschraube mit Innensechskant M8x35 – ISO 7380 ZNS	1 St.
7	01 210 74	Hutmutter M8 – DIN 986 ZNS	1 St.
8	01 320 63	Scheibe 8,4 – ISO 7090 ZNS	2 St.
9	01 325 03	Scheibe Messing B8,4 – ISO 7090	2 St.
10	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	1 St.
11	09 990 13	Kopfstützenhalter gekröpft	1 St.
12	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	1 St.
13	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	1 St.
14	G20 422 21	Halter Rückenpelotte und Aufnahme Kopfstütze (Doppel-UNI-Halter)	1 St.
15	01 156 54	Linsenkopschr. mit Innensechskant M5x12 ISO 7380F schwarz	4 St.
16	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.

Brustpelotte nach Maß im Sonderbau

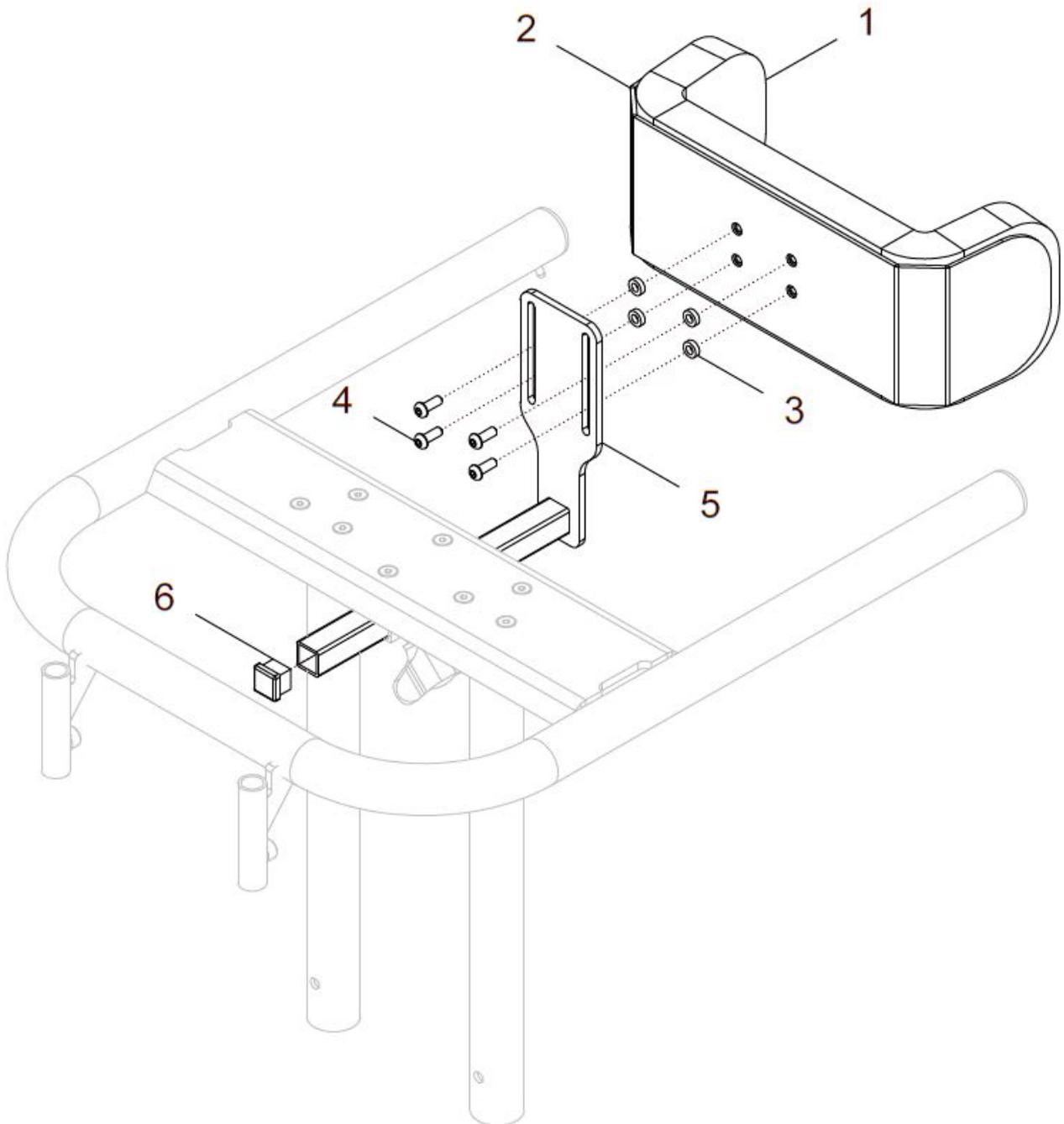


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	G28 431 00	Brustpelotte nach Maß im Sonderbau kpl. Brustpelotte nach Maß im Sonderbau mit Halterung an Tischrahmen Höhe Brustpelotte = 12cm Ducke Schaumstoff: 3cm Seitliche Tiefe ca. 9cm Breite Thorax: ? Farbe Bezug: ?	1 St.
1 - 2	G28 431 10	Brustpelotte nach Maß (ohne Halter) (ohne Halterung) Breite Thorax: ? Farbe Bezug: ?	1 St.
1	G28 431 11	Brustpelotte nach Maß (ohne Bezug) Breite Thorax: ?	1 St.
2	G28 431 81	Bezug für Brustpelotte nach Maß Breite Thorax: ? Farbe Bezug: ?	1 St.
3	G28 415 23	Distanzbuchse 3,5mm	4 St.
4	01 156 66	Linsenkopfschr. mit Innensechskant M6x16 ISO 7380F schwarz	4 St.
5a	G28 415 42	Brustpelottenhalter 628 (standard)	1 St.
6	04 210 41	Verschlussstopfen – 20x20	1 St.

Sonder-Brustpelottenhalter kurz


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
5b	G28 415 46	Brustpelottenhalter 628 kurz (= alternativ)	1 St.

Tisch

Gruppe 5

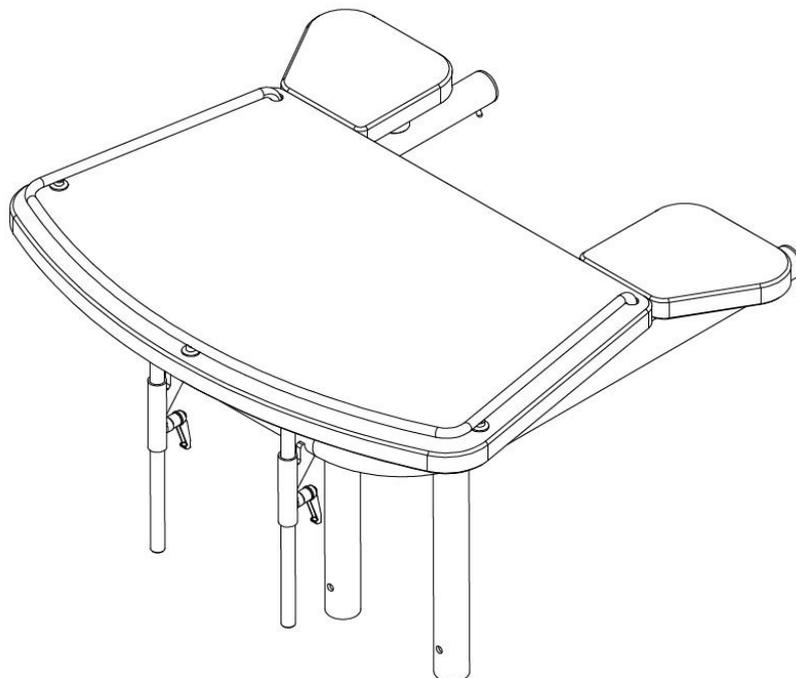

Tischrahmen standard

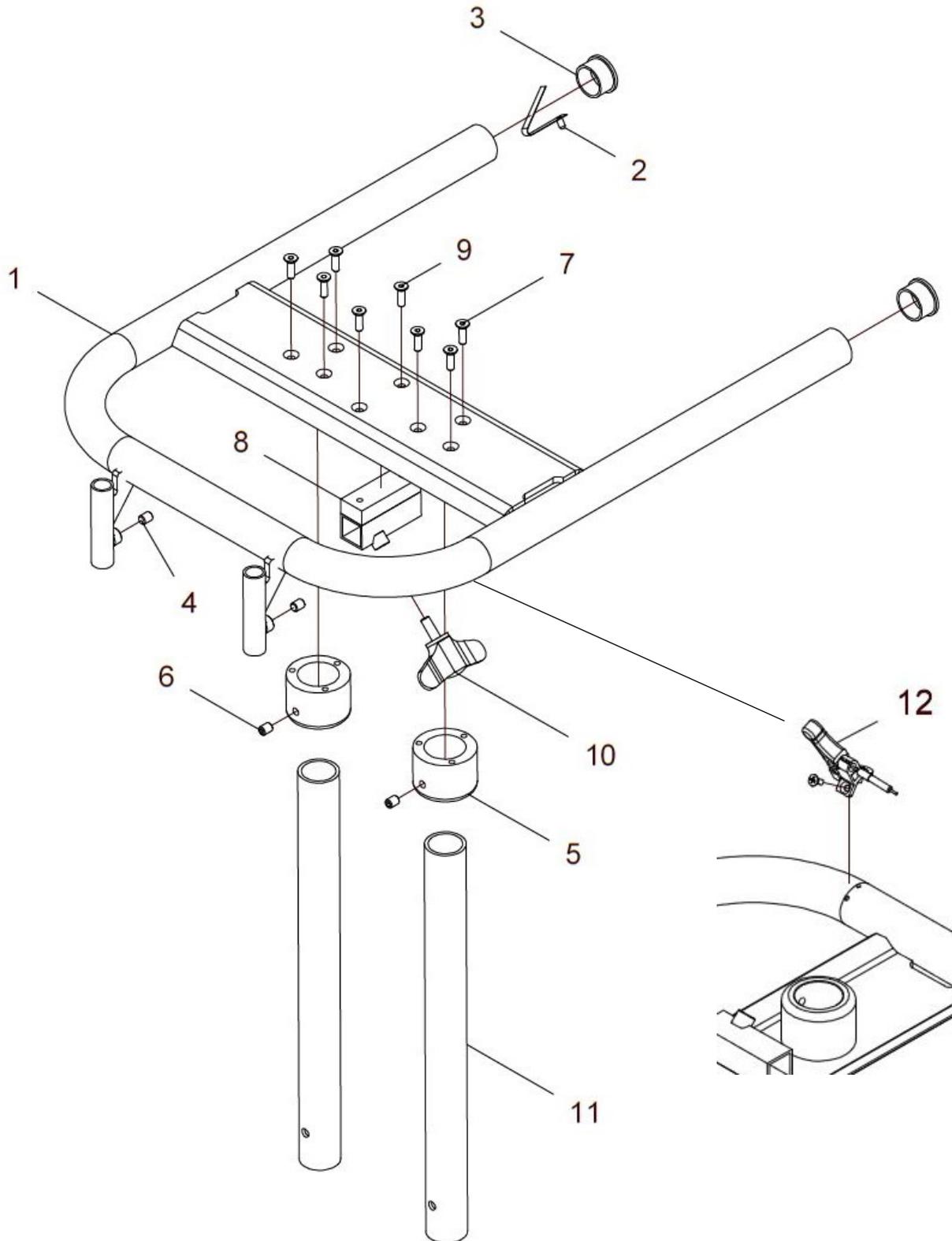

neue Version ab 11/2018 (ab Serien-Nr. SC68-2247)


Tischrahmen für Grundgestell 628 Standard:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	G28 510 00	Tischrahmen 628 mit Verstellrohren kpl. mit den Verstellrohren Ø35mm FM: ?	1 St.
1 – 10	G28 511 10	Tischrahmen 628 (ohne Verstellrohre) FM: ?	1 St.
1	G28 511 11	Tischrahmen 628 FM: ?	1 St.
2	02 320 03	Stativfeder mit Bolzen Ø5 x 10	1 St.
3	04 210 18	Verschlussstopfen Ø34 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
5	G20 511 12	Säulenaufnahme (für Verstellrohr Ø35)	2 St.
6	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
7	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	6 St.
8	G20 511 13	Pelottenhalteraufnahmerohr	1 St.
9	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	2 St.
10	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	1 St.
11	G28 101 61	Verstellrohr Ø35 Campus 628	2 St.

Tischrahmen für Grundgestell 628 ALLROUND:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	G28 510 05	Tischrahmen 628 ALLROUND mit Verstellrohren kpl. mit den Verstellrohren Ø35mm FM: ?	1 St.
1 – 10	G28 511 15	Tischrahmen 628 ALLROUND (ohne Verstellrohre) FM: ?	1 St.
1	G28 511 16	Tischrahmen 628 ALLROUND mit Gewinde M4 FM: ?	1 S
2	02 320 03	Stativfeder mit Bolzen Ø5 x 10	1 St.
3	04 210 18	Verschlussstopfen Ø34 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
5	G20 511 12	Säulenaufnahme (für Verstellrohr Ø35)	2 St.
6	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
7	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	6 St.
8	G20 511 13	Pelottenhalteraufnahmerohr	1 St.
9	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	2 St.
10	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	1 St.
11	G28 101 61	Verstellrohr Ø35 Campus 628	2 St.
12	G28 123 20	Auslösezug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround mit Hebel und Abstützung (für Tischrahmen) Tischmaß A: ???	1 St.

Tischrahmen tiefenverstellbar

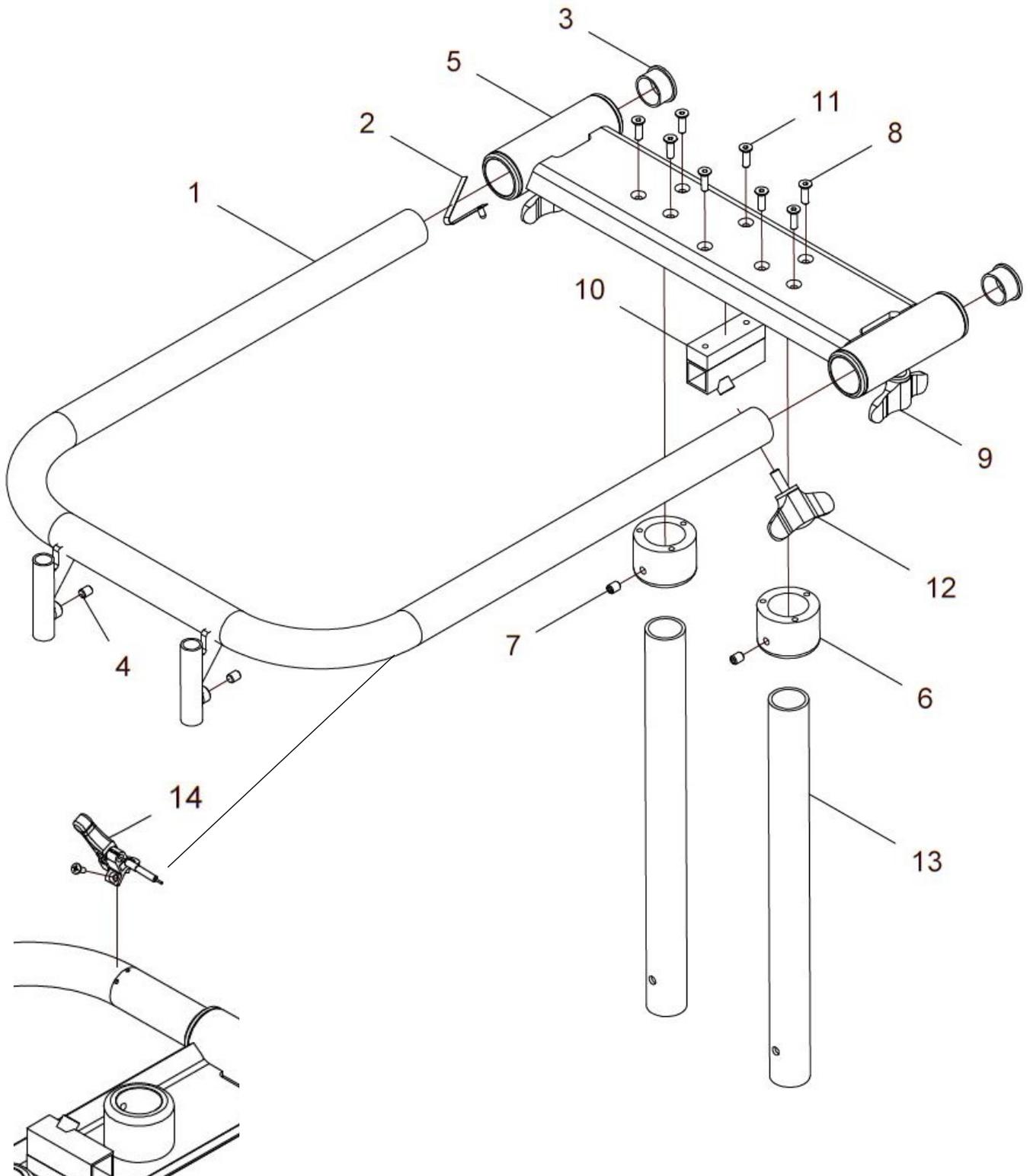

neue Version ab 11/2018 (ab Serien-Nr. SC68-2247)


Tischrahmen tiefenverstellbar für Grundgestell 628:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	G28 522 00	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 mit Verstellrohren kpl. mit den Verstellrohren Ø35mm FM: ?	1 St.
1 - 12	G28 522 10	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 (ohne Verstellrohre) FM: ?	1 St.
1	G28 522 21	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 FM: ?	1 St.
2	02 320 03	Stativfeder mit Bolzen Ø5 x 10	1 St.
3	04 210 18	Verschlussstopfen Ø34 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
5	G28 522 40	Querverbindung mit Buchsen tiefenverstellbar 628	1 St.
6	G20 511 12	Säulenaufnahme (für Verstellrohr Ø35)	2 St.
7	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	4 St.
8	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	6 St.
9	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	2 St.
10	G20 511 13	Pelottenhalteraufnahmerohr	1 St.
11	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	2 St.
12	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	1 St.
13	G28 101 61	Verstellrohr Ø35 oben Campus 628 (L=400mm)	2 St.

Tischrahmen tiefenverstellbar für Grundgestell 628 ALLROUND:


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	G28 522 05	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 ALLROUND m. Verst.rohren kpl. mit den Verstellrohren Ø35mm FM: ?	1 St.
1 - 12	G28 522 15	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 ALLROUND (ohne Verstellrohre) FM: ?	1 St.
1	G28 522 26	Tischrahmen tiefenverstellbar 628 ALLROUND mit Gewinde M4 FM: ?	1 St.
2	02 320 03	Stativfeder mit Bolzen Ø5 x 10	1 St.
3	04 210 18	Verschlussstopfen Ø34 schwarz	2 St.
4	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	2 St.
5	G28 522 40	Querverbindung mit Buchsen tiefenverstellbar 628	1 St.
6	G20 511 12	Säulenaufnahme (für Verstellrohr Ø35)	2 St.
7	01 131 47S	Gewindestift M8x10 – DIN 913 schwarz	4 St.
8	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	6 St.
9	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	2 St.
10	G20 511 13	Pelottenhalteraufnahmerohr	1 St.
11	01 120 12	Senkkopfschraube M6x20 - ISO 10642 A2	2 St.
12	01 191 34	Flügelschraube groß - M8x20	1 St.
13	G28 101 61	Verstellrohr Ø35 oben Campus 628 (L=400mm)	2 St.
14	G28 123 20	Auslösezug für Gasdruckfeder Campus 628 Allround mit Hebel und Abstützung (für Tischrahmen) Tischmaß A: ???	1 St.

Tischplatte mit Gelenk standard

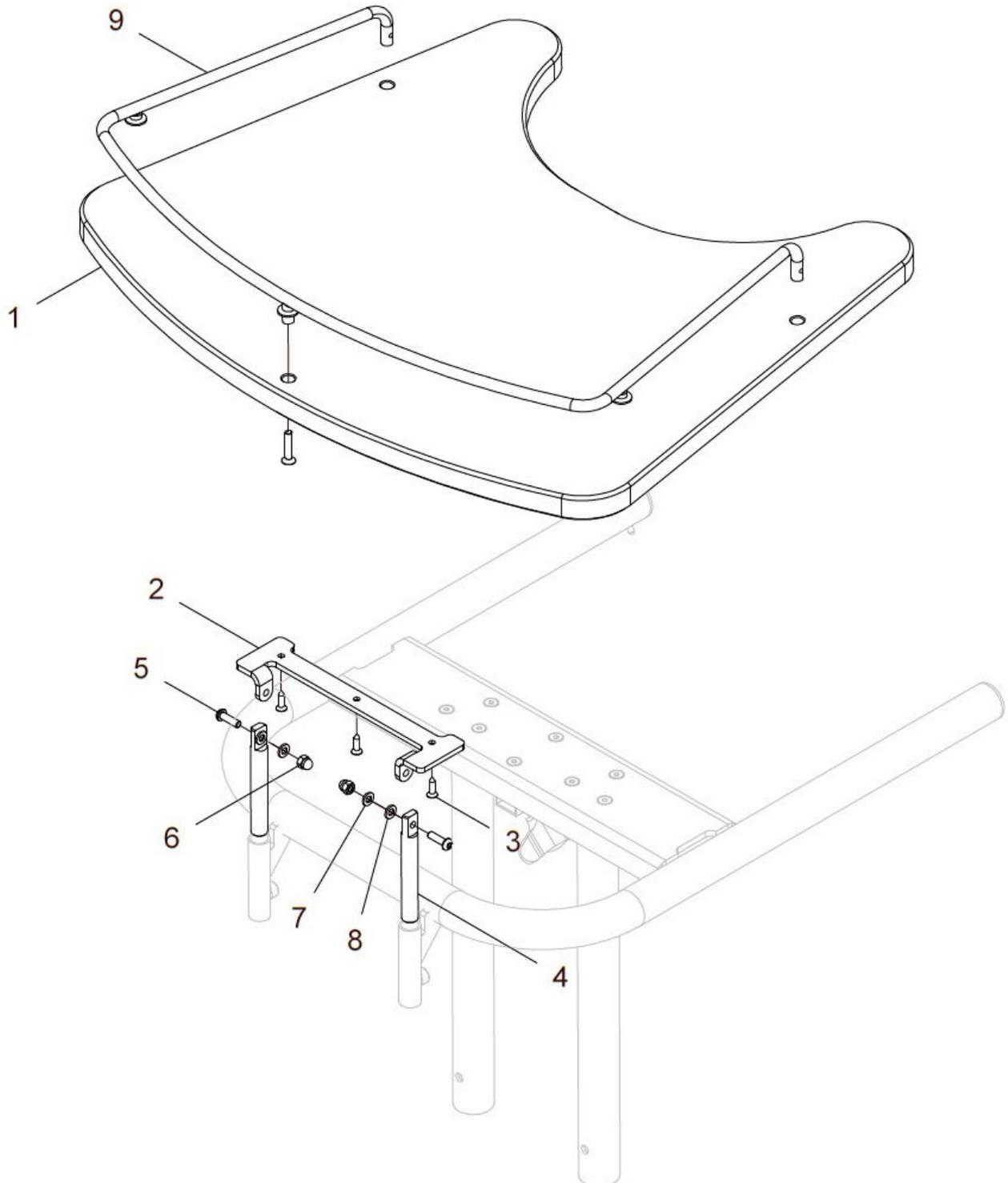

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	G28 513 00	Tischplatte klein 628 mit Gelenk standard kpl.	1 St.
1	G28 513 16	Tischplatte klein für Campus 628	1 St.
2 – 8	G20 512 10	Tischgelenk standard für Tischplatte kpl.	1 St.
2	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
3	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
4	G20 512 11	Verstellstange 110mm (standard)	2 St.
5	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
6	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
8	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
9a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
9b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tischplatte mit Gelenk schrägverstellbar

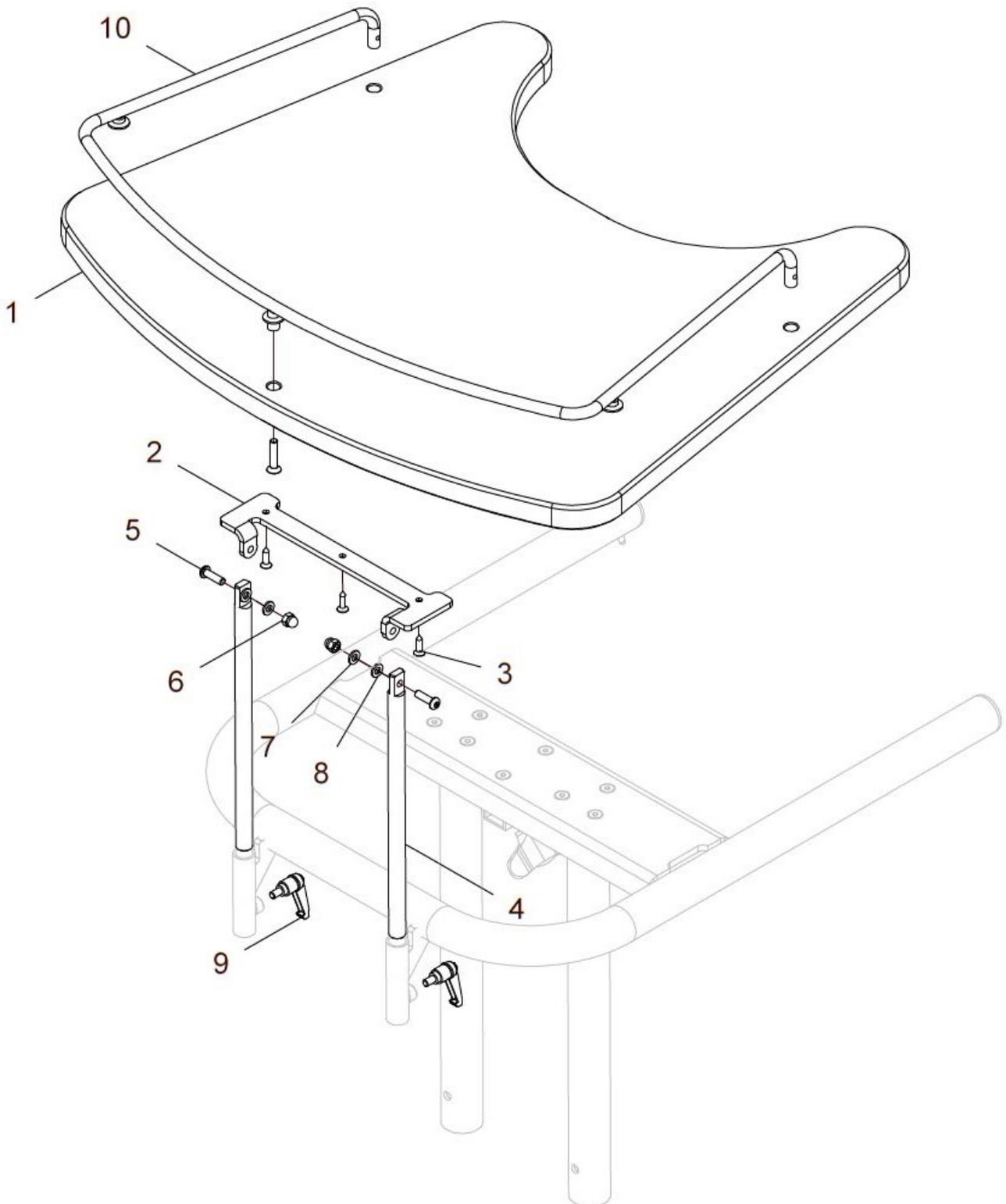

Tischplatte schrägverstellbar für Grundgestell 628:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	G28 513 05	Tischplatte klein 628 mit Gelenk schrägverstellbar kpl.	1 St.
1	G28 513 16	Tischplatte klein für Campus 628	1 St.
2 – 9	G20 512 60	Tischgelenk schrägverstellbar für Tischplatte kpl.	2 St.
2	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
3	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
4	G20 512 61	Verstellstange 270mm	2 St.
5	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
6	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
8	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
9	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
10	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.


Tischplatte schrägverstellbar für Grundgestell 628 ALLROUND:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	G28 513 07	Tischplatte klein 628 mit Gelenk schrägverstellbar ALL kpl.	1 St.
1	G28 513 16	Tischplatte klein für Campus 628	1 St.
2 – 9	G20 512 70	Tischgelenk schrägverstellbar ALL für Tischplatte kpl.	2 St.
2	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
3	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
4	G20 512 71	Verstellstange 340mm	2 St.
5	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
6	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
8	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
9	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
10	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.

Tischplatte klein mit Mulde und Gelenk

Campus 620: Gelenk 270 für standard oder schrägverstellbar

Campus 620 ALLROUND: Gelenk 340 für schrägverstellbar

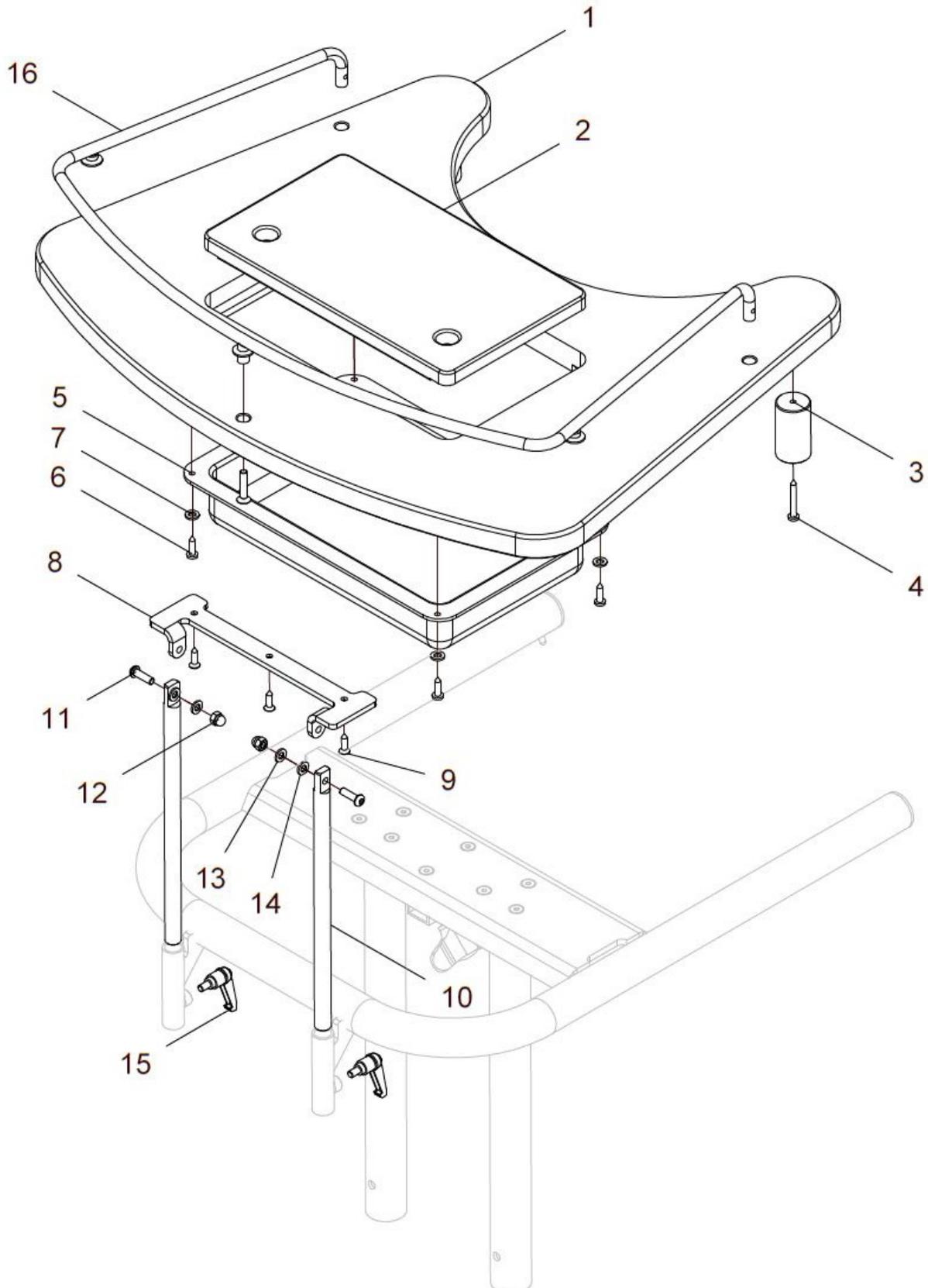


Tischplatte mit Mulde standard + schrägverstellbar / für Grundgestell 628:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	G28 523 00	Tischplatte klein mit Mulde mit Gelenk (270) kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel und Gelenk	1 St.
1 – 7	G28 523 10	Tischplatte klein mit Mulde und Deckel kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel (ohne Gelenk)	1 St.
1	G28 523 16	Tischplatte klein mit Mulde für Campus 628	1 St.
2	G28 523 12	Muldendeckel klein für Tischplatte 628 mit Mulde	1 St.
3	G28 523 18	Distanz für Tischplatte mit Mulde Campus 628	2 St.
4	01 501 47	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 4,5x35	2 St.
5	G50 531 21	Wanne 280x175 für Tisch klein	1 St.
6	01 501 50	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	01 321 21	Scheibe groß 5,3 – ISO 7093 schwarz	4 St.
8 – 15	G20 512 60	Tischgelenk 270 für Tischplatte mit Mulde kpl.	2 St.
8	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
9	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
10	G20 512 61	Verstellstange 270mm	2 St.
11	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
14	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
15	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
16a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
16b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tischplatte mit Mulde schrägverstellbar / für Grundgestell 628 ALLROUND:


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	G28 523 05	Tischplatte klein mit Mulde mit Gelenk schräg. / ALL. kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel und Gelenk 340	1 St.
1 – 7	G28 523 10	Tischplatte klein mit Mulde und Deckel kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel (ohne Gelenk)	1 St.
1	G28 523 16	Tischplatte klein mit Mulde für Campus 628	1 St.
2	G28 523 12	Muldendeckel klein für Tischplatte 628 mit Mulde	1 St.
3	G28 523 18	Distanz für Tischplatte mit Mulde Campus 628	2 St.
4	01 501 47	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 4,5x35	2 St.
5	G50 531 21	Wanne 280x175 für Tisch klein	1 St.
6	01 501 50	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	01 321 21	Scheibe groß 5,3 – ISO 7093 schwarz	4 St.
8 – 15	G20 512 70	Tischgelenk 340 für Tischplatte mit Mulde kpl.	2 St.
8	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
9	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
10	G20 512 71	Verstellstange 340mm	2 St.
11	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
14	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
15	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
16a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
16b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tisch klein gerade mit Tischverlängerung mit Gelenk standard

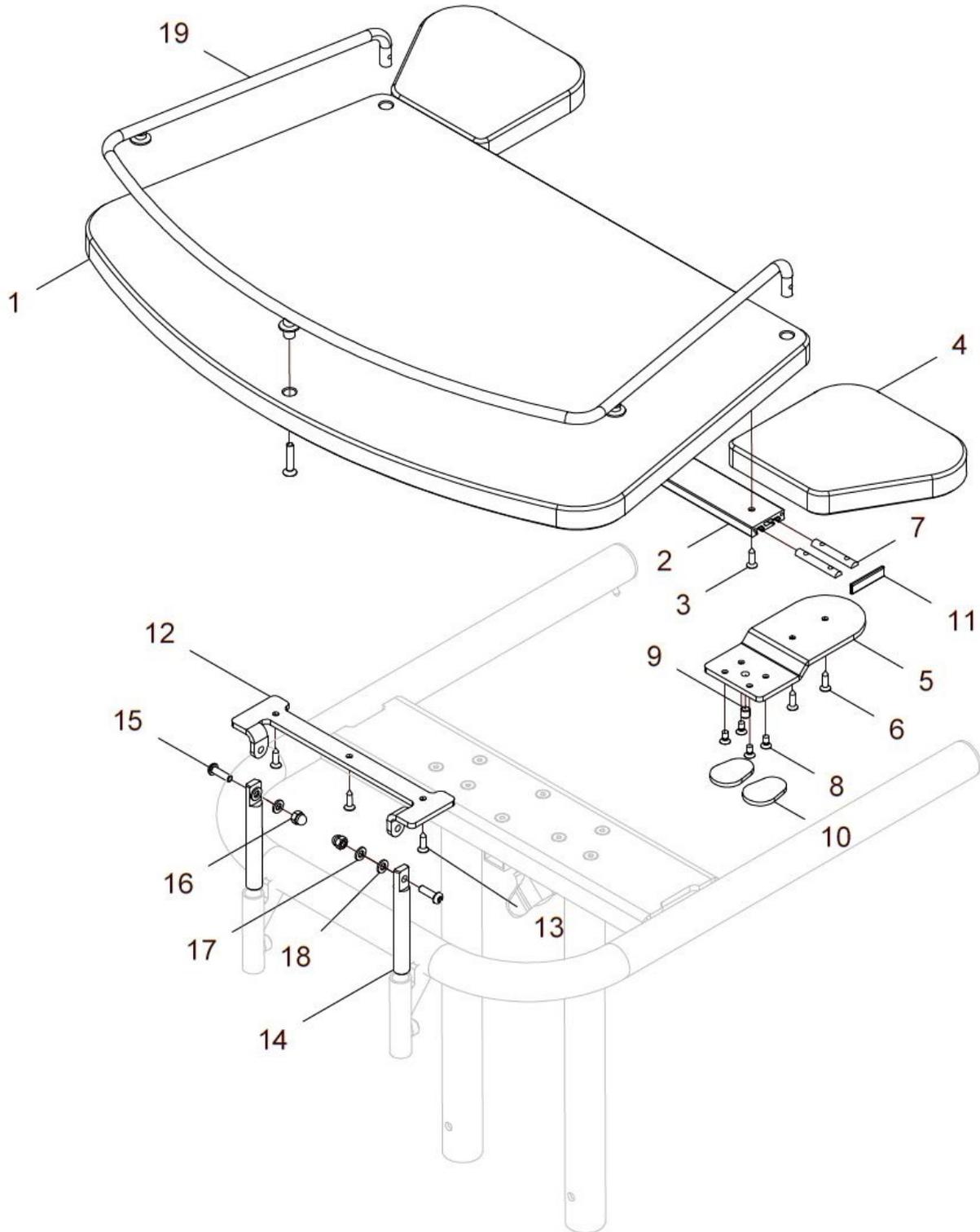

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	G28 513 50	Tisch klein gerade mit Tischverlängerung und Gelenk stand. kpl. Tischplatte klein gerade mit Führungsprofil, Befestigungsplatten, Tischverlängerung und Tischgelenk standard	1 St.
1	G28 513 61	Tischplatte klein gerade Campus 628	1 St.
2 - 11	G28 513 65	Tischverlängerung rechts und links mit Befestigung kpl. mit Führungsprofil, Befestigungsplatten und Tischverlängerung	1 Paar
2	G28 513 69	Führungsprofil Campus 628 Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
3	01 120 04	Senkschraube mit Innensechskant M5x20 – DIN 7991	4 St.
4a	G28 513 66	Tischverlängerung <u>rechts</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
4b	G28 513 67	Tischverlängerung <u>links</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
5	G28 513 68	Befestigungsplatte Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
6	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	91 411 01	Nutenstein	4 St.
8	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	8 St.
9	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913	2 St.
10	90 511 08	Abdeckung	4 St.
11	04 210 55	Abdeckkappe 40x10 schwarz	4 St.
12 – 18	G20 512 10	Tischgelenk standard für Tischplatte kpl.	1 St.
12	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
13	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
14	G20 512 11	Verstellstange 110mm (standard)	2 St.
15	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
16	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986 A2	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
18	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
19a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
19b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tisch gerade mit Tischverlängerung mit Gelenk schrägverstellbar

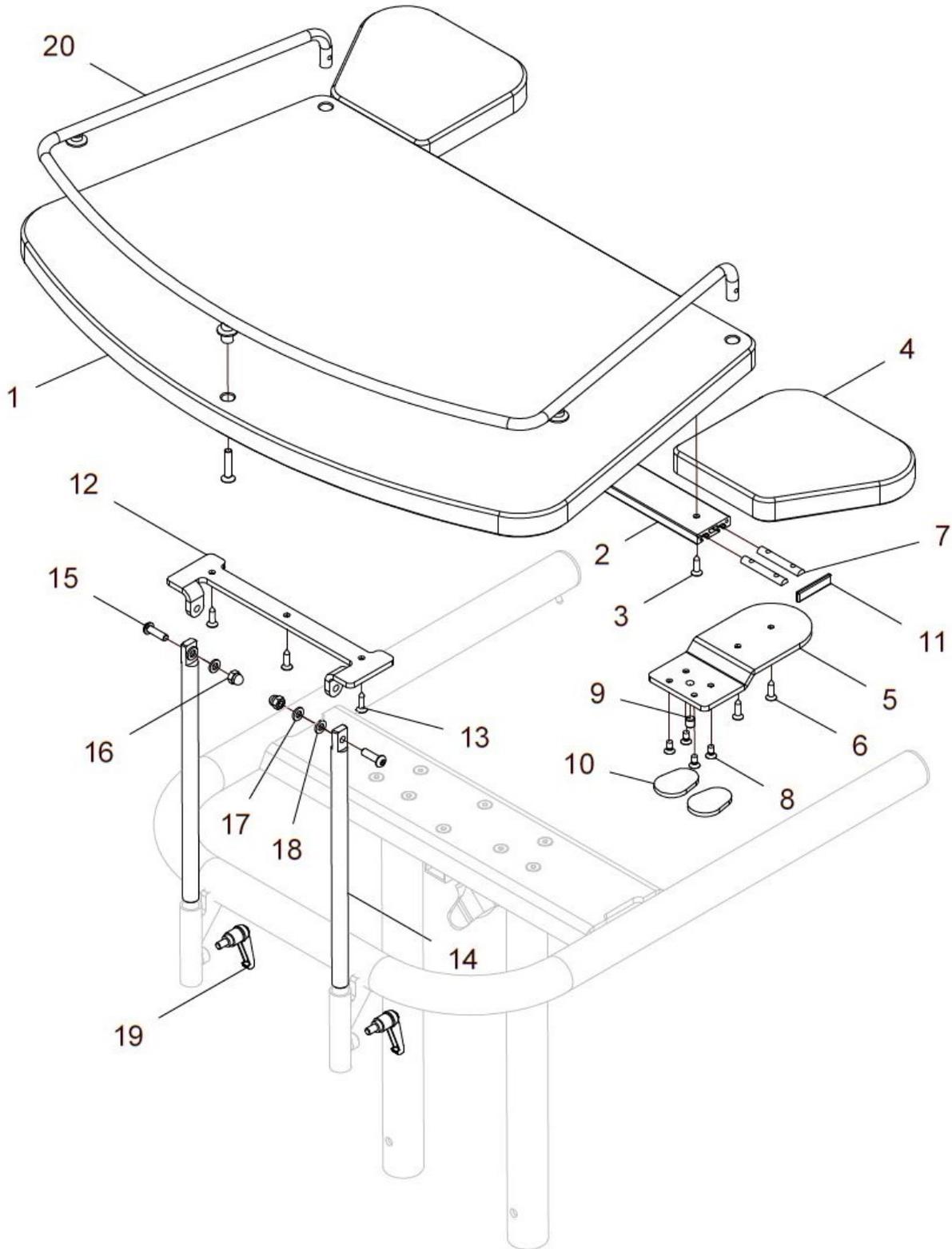

Tischplatte gerade schrägverstellbar für Grundgestell 628:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	G28 513 55	Tisch klein gerade mit Tischverlängerung und Gelenk schräg. kpl. Tischplatte klein gerade mit Führungsprofil, Befestigungsplatten, Tischverlängerung und Tischgelenk schrägverstellbar	1 St.
1	G28 513 61	Tischplatte klein gerade Campus 628	1 St.
2 - 11	G28 513 65	Tischverlängerung rechts und links mit Befestigung kpl. mit Führungsprofil, Befestigungsplatten und Tischverlängerung	1 Paar
2	G28 513 69	Führungsprofil Campus 628 Tischverlängerung seitlich verst.	2 St.
3	01 120 04	Senkschraube mit Innensechskant M5x20 – DIN 7991	4 St.
4a	G28 513 66	Tischverlängerung <u>rechts</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
4b	G28 513 67	Tischverlängerung <u>links</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
5	G28 513 68	Befestigungsplatte Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
6	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	91 411 01	Nutenstein	4 St.
8	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	8 St.
9	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913	2 St.
10	90 511 08	Abdeckung	4 St.
11	04 210 55	Abdeckkappe 40x10 schwarz	4 St.
12 - 19	G20 512 60	Tischgelenk schrägverstellbar (270) für Tischplatte kpl.	2 St.
12	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
13	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
14	G20 512 61	Verstellstange 270mm	2 St.
15	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
16	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
18	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
19	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
20a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
20b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tischplatte schrägverstellbar für Grundgestell 628 ALLROUND:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	G28 513 57	Tisch klein gerade m. Tischverlängerung u. Gelenk schr. ALL kpl. Tischplatte klein gerade mit Führungsprofil, Befestigungsplatten, Tischverlängerung und Tischgelenk schrägverstellbar ALLROUND	1 St.
1	G28 513 61	Tischplatte klein gerade Campus 628	1 St.
2 - 11	G28 513 65	Tischverlängerung rechts und links mit Befestigung kpl. mit Führungsprofil, Befestigungsplatten und Tischverlängerung	1 Paar
2	G28 513 69	Führungsprofil Campus 628 Tischverlängerung seitlich verst.	2 St.
3	01 120 04	Senkschraube mit Innensechskant M5x20 – DIN 7991	4 St.
4a	G28 513 66	Tischverlängerung <u>rechts</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
4b	G28 513 67	Tischverlängerung <u>links</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
5	G28 513 68	Befestigungsplatte Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
6	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	91 411 01	Nutenstein	4 St.
8	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	8 St.
9	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913	2 St.
10	90 511 08	Abdeckung	4 St.
11	04 210 55	Abdeckkappe 40x10 schwarz	4 St.
12 - 19	G20 512 70	Tischgelenk schrägverstellbar ALL (340) für Tischplatte kpl.	2 St.
12	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
13	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
14	G20 512 71	Verstellstange 340mm	2 St.
15	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
16	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
18	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
19	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
20a	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.
20b	G28 514 40	Tischumrandung Blech klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628 ##### Blechstreifen #####	1 St.

Tischplatte gerade mit Mulde standard + schrägverstellbar für Grundgestell 628:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 25	G28 523 50	Tischplatte klein gerade mit Mulde mit Gelenk 270 kpl. Tischplatte klein gerade mit Mulde und Deckel, mit Führungsprofil, Befestigungsplatten, Tischverlängerungen und mit Gelenk 270 für standard oder schrägverstellbar beim Campus 628	1 St.
1 – 7	G28 523 60	Tischplatte klein gerade mit Mulde und Deckel kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel (ohne Gelenk)	1 St.
1	G28 523 61	Tischplatte klein gerade mit Mulde für Campus 628	1 St.
2	G28 523 12	Muldendeckel klein für Tischplatte mit Mulde Campus 628	1 St.
3	G28 523 18	Distanz für Tischplatte mit Mulde Campus 628	2 St.
4	01 501 47	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 4,5x35	2 St.
5	G50 531 21	Wanne 280x175 für Tisch klein	1 St.
6	01 501 50	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	01 321 21	Scheibe groß 5,3 – ISO 7093 schwarz	4 St.
8 - 17	G28 513 65	Tischverlängerung rechts und links mit Befestigung kpl. mit Führungsprofil, Befestigungsplatten und Tischverlängerung	1 Paar
8	G28 513 69	Führungsprofil Campus 628 Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
9	01 120 04	Senkschraube mit Innensechskant M5x20 – DIN 7991	4 St.
10a	G28 513 66	Tischverlängerung <u>rechts</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
10b	G28 513 67	Tischverlängerung <u>links</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
11	G28 513 68	Befestigungsplatte Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
12	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
13	91 411 01	Nutenstein	4 St.
14	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	8 St.
15	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913	2 St.
16	90 511 08	Abdeckung	4 St.
17	04 210 55	Abdeckkappe 40x10 schwarz	4 St.
18 – 25	G20 512 60	Tischgelenk 270 für Tischplatte mit Mulde kpl.	1 St.
18	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
19	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
20	G20 512 61	Verstellstange 270mm	2 St.
21	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
22	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986	2 St.
23	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
24	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
25	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
26	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.

Tischplatte gerade mit Mulde schrägverstellbar für Grundgestell 628 ALLROUND:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 25	G28 523 55	Tischplatte klein gerade mit Mulde mit Gelenk schräg. ALL. kpl. Tischplatte klein gerade mit Mulde und Deckel, mit Führungsprofil, Befestigungsplatten, Tischverlängerungen und mit Gelenk 340 schrägverstellbar für Campus 628 ALLROUND	1 St.
1 – 7	G28 523 60	Tischplatte klein gerade mit Mulde und Deckel kpl. Tischplatte klein mit Mulde und Deckel (ohne Gelenk)	1 St.
1	G28 523 61	Tischplatte klein gerade mit Mulde für Campus 628	1 St.
2	G28 523 12	Muldendeckel klein für Tischplatte mit Mulde Campus 628	1 St.
3	G28 523 18	Distanz für Tischplatte mit Mulde Campus 628	2 St.
4	01 501 47	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 4,5x35	2 St.
5	G50 531 21	Wanne 280x175 für Tisch klein	1 St.
6	01 501 50	Flachrundkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
7	01 321 21	Scheibe groß 5,3 – ISO 7093 schwarz	4 St.
8 - 17	G28 513 65	Tischverlängerung rechts und links mit Befestigung kpl. mit Führungsprofil, Befestigungsplatten und Tischverlängerung	1 Paar
8	G28 513 69	Führungsprofil Campus 628 Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
9	01 120 04	Senkschraube mit Innensechskant M5x20 – DIN 7991	4 St.
10a	G28 513 66	Tischverlängerung <u>rechts</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
10b	G28 513 67	Tischverlängerung <u>links</u> seitlich verstellbar Campus 628	1 St.
11	G28 513 68	Befestigungsplatte Tischverlängerung seitlich verstellbar	2 St.
12	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	4 St.
13	91 411 01	Nutenstein	4 St.
14	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	8 St.
15	01 131 47A	Gewindestift M8x6 – DIN 913	2 St.
16	90 511 08	Abdeckung	4 St.
17	04 210 55	Abdeckkappe 40x10 schwarz	4 St.
18 – 25	G20 512 70	Tischgelenk 340 für Tischplatte mit Mulde kpl.	1 St.
18	G20 523 71	Verstellplatte für Tischplatte	1 St.
19	01 502 50	Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz 5x20	3 St.
20	G20 512 71	Verstellstange 340mm	2 St.
21	01 153 23	Linsenkopfschraube mit Innensechskant M6x25 – ISO 7380 vz	2 St.
22	01 210 83	Hutmutter M6 – DIN 986	2 St.
23	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090	2 St.
24	01 310 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 PE	2 St.
25	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	2 St.
26	G28 514 30	Tischumrandung rund klein 628 kpl. für Tischplatte klein 628	1 St.

