

# Ersatzteilkatalog

# FILOU



VD 933 – 08 / 2020

BeRollKa-aktiv  
Rollstuhltechnik GmbH  
Jahnstrasse 16  
D-74889 Sinsheim

Tel.: 07261 – 7351 - 0  
Fax: 07261 – 7351 - 10  
info@berollka.de  
www.berollka.de



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der BeRollKa-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2020 BeRollKa-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

# Ersatzteilkatalog

**Kinder-Aktivrollstuhl mit starrem Rahmen**

# FILOU



## Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellst möglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle BeRollKa-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.

Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Rollstuhl oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe.

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `FM:..?.` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code, bei `FB:..?.` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `RH...`, `ST...` und `SB...` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Rollstuhltyp).

**Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl, sowie Kundenvereinbarungen, die die instandsetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.**

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

**Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!**

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.


Ihr **Berollka<sup>®</sup>-aktiv** Team



## Baugruppenübersicht

Alle unsere Rollstühle bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Rollstuhl ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.

Zum Beispiel gehören die Greifringe oder die Steckachsen zur Baugruppe RAD (= Gruppe 6).

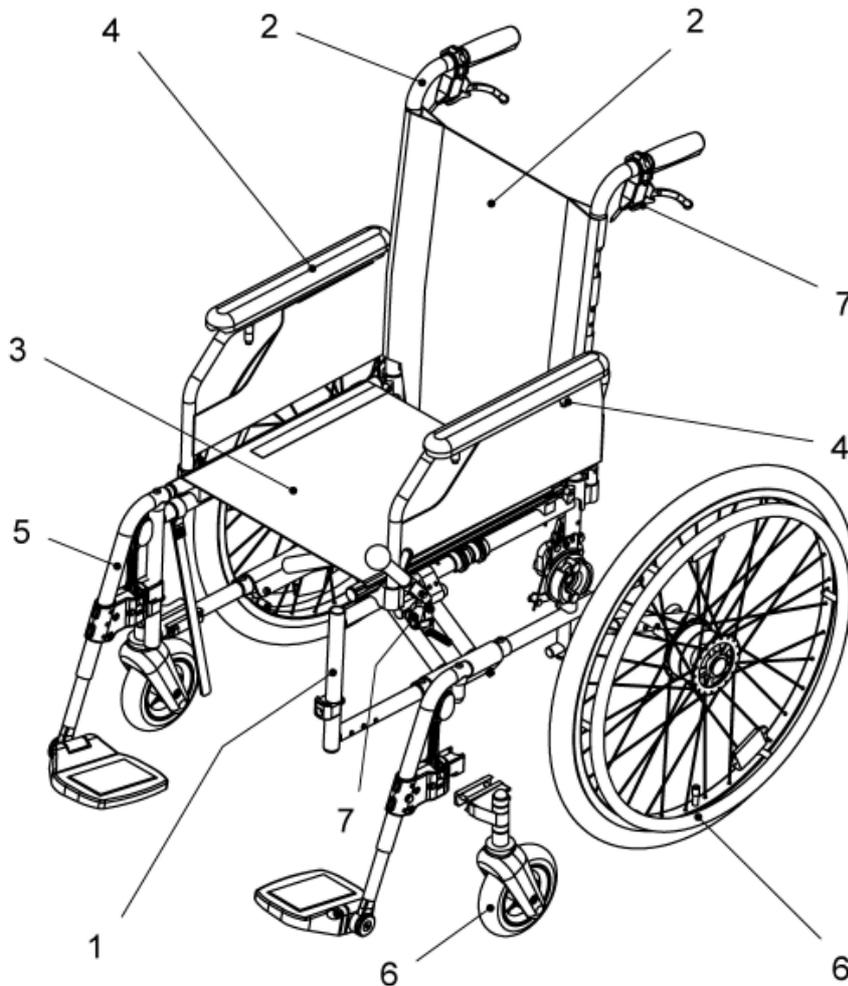

### Baugruppen:

Rahmen .....	Gruppe 1	Fußbrett .....	Gruppe 5
Rücken .....	Gruppe 2	Rad .....	Gruppe 6
Sitz und Kreuzstrebe ....	Gruppe 3	Bremse .....	Gruppe 7
Seitenteil .....	Gruppe 4		

### Abkürzungen:

**SB** = Sitzbreite

**ST** = Sitztiefe

**RH** = Rückenhöhe

**FM** = Farbe der Metallteile

**FB** = Farbe der Bespannung

**o.Bild** = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.  
(Download ist auf unserer Homepage [www.berollka.de](http://www.berollka.de) möglich)

## Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für BeRollKa-aktiv Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

**BeRollKa-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.**

**BeRollKa-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.**

### Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- ◆ Beim Austausch von Teilen nur die für diesen Rollstuhl vorgesehenen Bauteile verwenden.
- ◆ Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- ◆ Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen.
- ◆ Führen Sie nach der Reparatur des Rollstuhls eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und Fahrverhalten. Prüfen Sie die **Bremsfähigkeit**, die **Lenkfähigkeit** und den **Geradeauslauf**.
- ◆ Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit den Rollstuhl dem Patienten übergeben.

### Anzugsdrehmomente Schrauben:

- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm
- M16 (Mutter Bremsträger/Steckachsenadapter) = 30Nm
- M20 (Mutter Adapter Steckachse FINDUS) = 30Nm


Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben






# Rahmen

## Gruppe 1

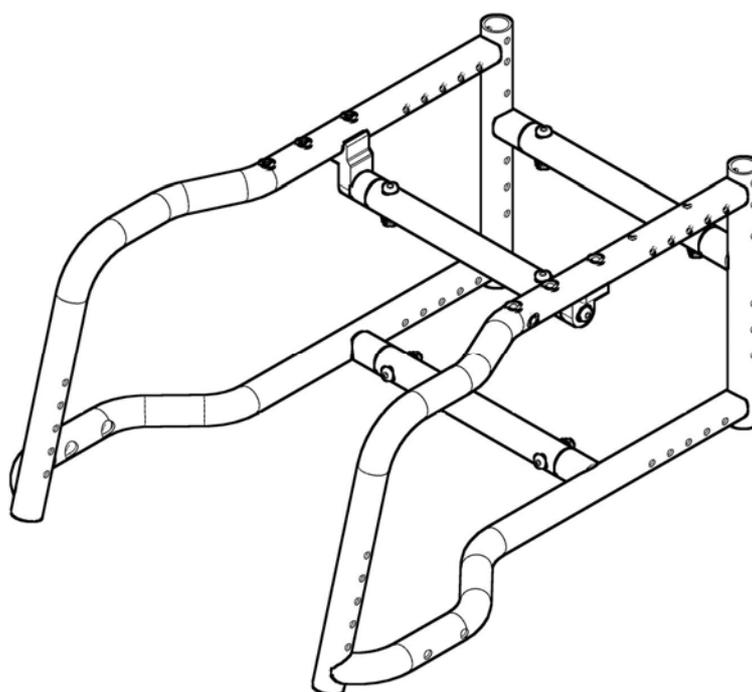


**Rahmen Abduktion verschweißt    Rahmenhöhe H1 (niedrig)**

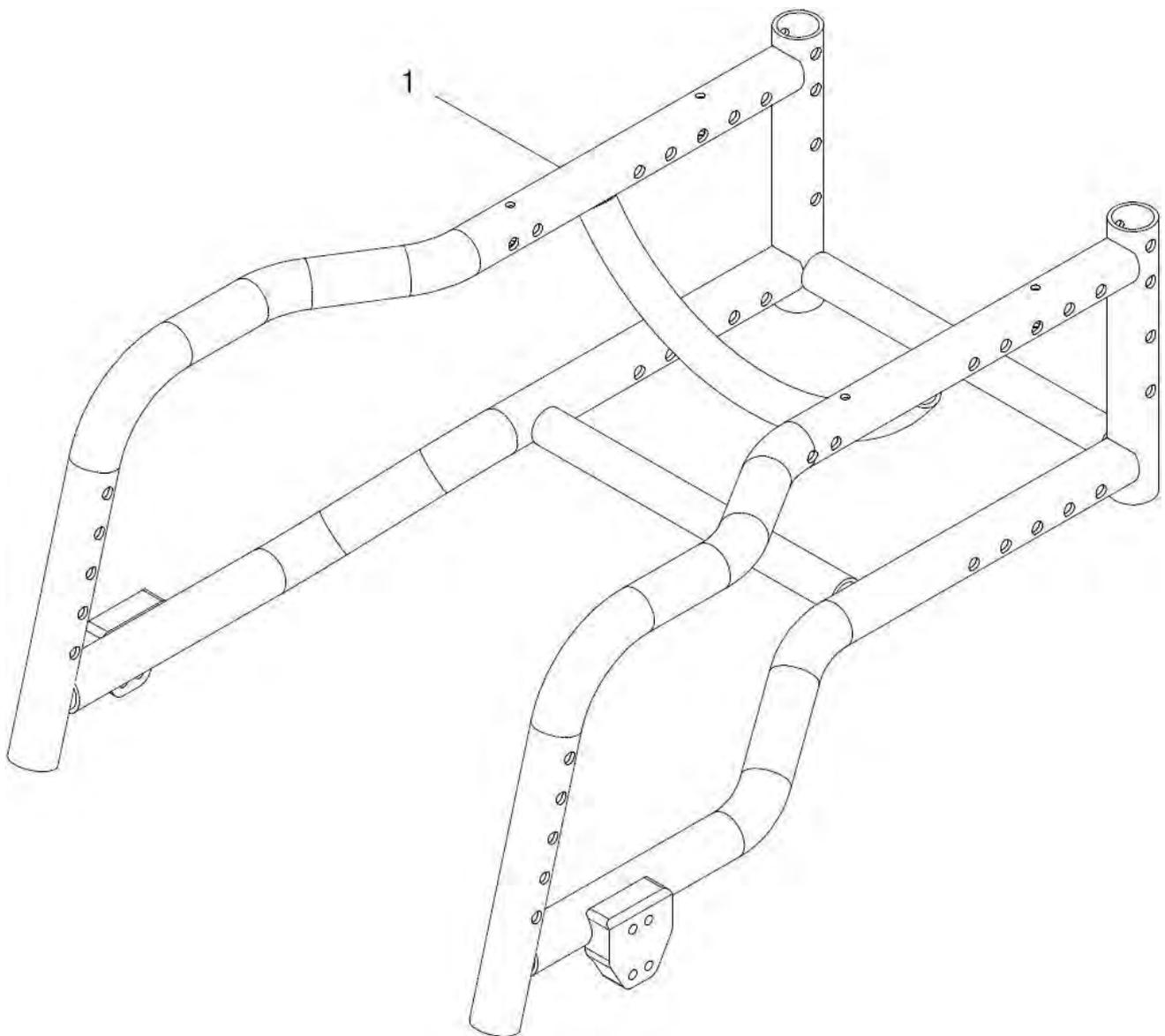


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a	28 115 11	Rahmen FILOU Abduktion verschweißt Gr. 1 (ST 22 – 26) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1b	28 115 21	Rahmen FILOU Abduktion verschweißt Gr. 2 (ST 26 – 30) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1c	28 115 31	Rahmen FILOU Abduktion verschweißt Gr. 3 (ST 30 – 34) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1d	28 115 41	Rahmen FILOU Abduktion verschweißt Gr. 4 (ST 34 – 38) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.

**Rahmen Abduktion verschweißt    Rahmenhöhe H2 (normal)**

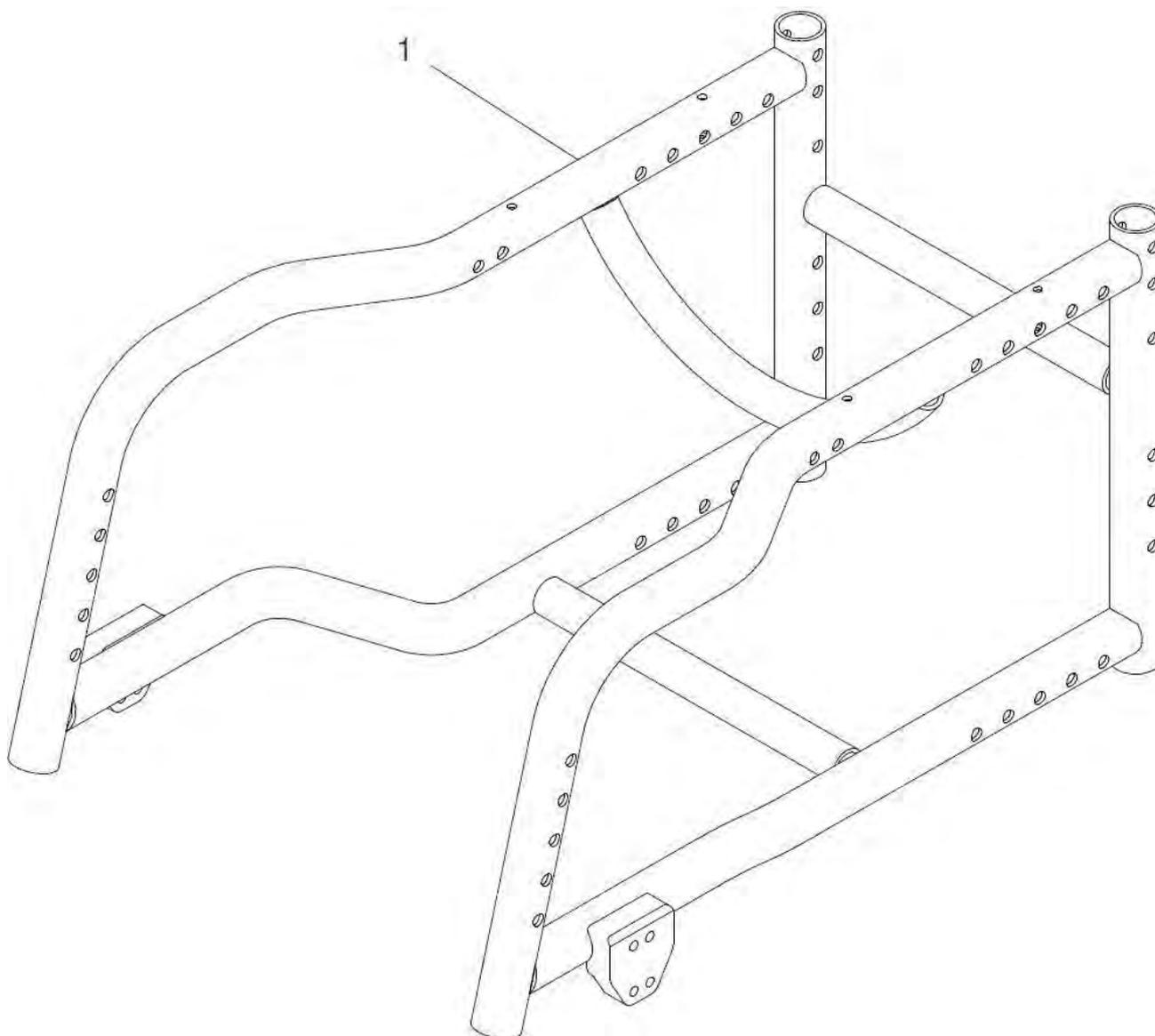


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a	28 115 16	Rahmen FILOU Abduktion verschw. Gr. 1 / H2 (ST 22 – 26) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1b	28 115 26	Rahmen FILOU Abduktion verschw. Gr. 2 / H2 (ST 26 – 30) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1c	28 115 36	Rahmen FILOU Abduktion verschw. Gr. 3 / H2 (ST 30 – 34) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1d	28 115 46	Rahmen FILOU Abduktion verschw. Gr. 4 / H2 (ST 34 – 38) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.

**Rahmen gerade verschweißt Rahmenhöhe H1 (niedrig)**

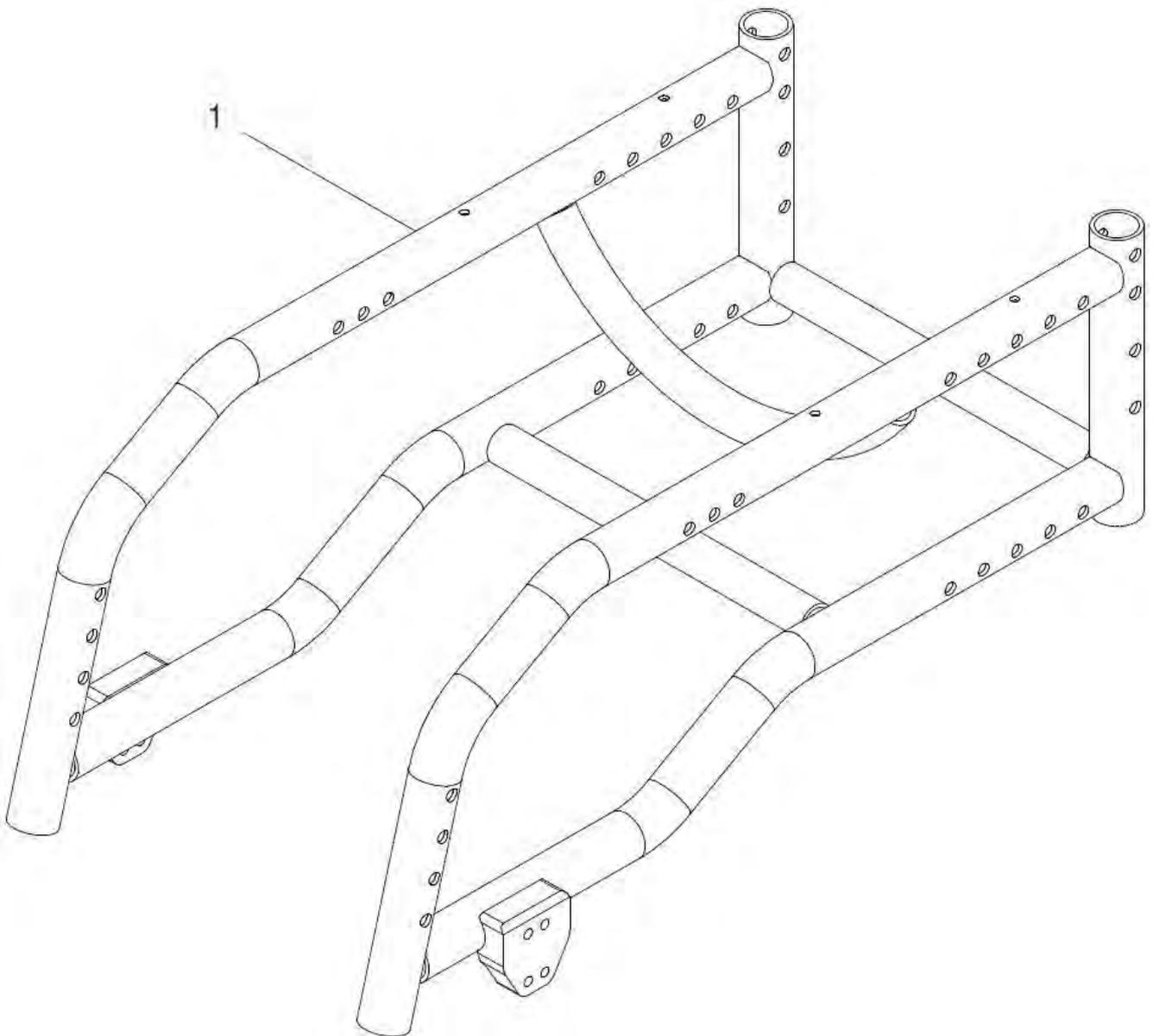

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a	28 111 11	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 1 (ST 22 – 26) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1b	28 111 21	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 2 (ST 26 – 30) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1c	28 111 31	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 3 (ST 30 – 34) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.
1d	28 111 41	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 4 (ST 34 – 38) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H1 FM: ? SB: ?	1 St.


**Rahmen gerade verschweißt Rahmenhöhe H2 (normal)**

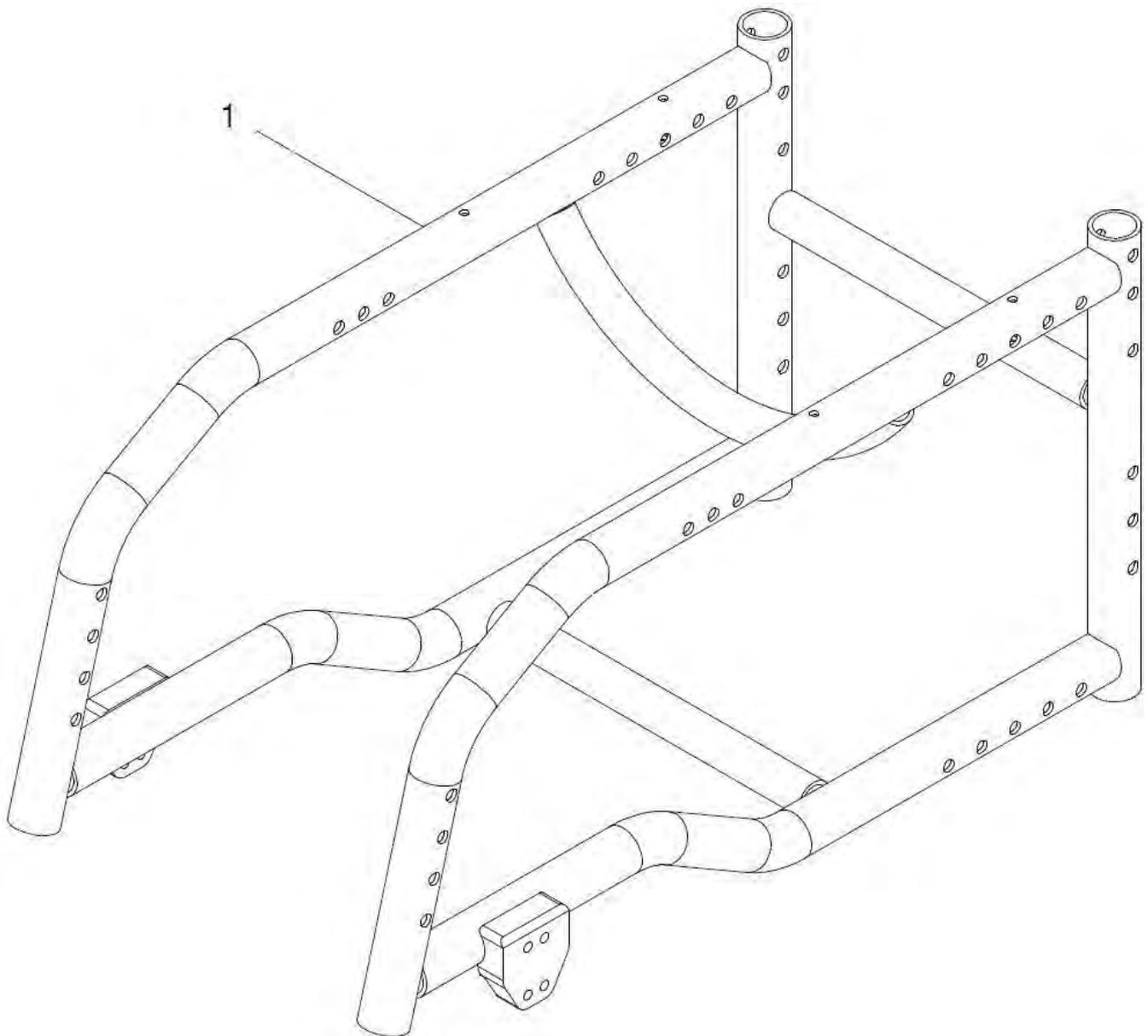

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a	28 111 16	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 1 / H2 (ST 22 – 26) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1b	28 111 26	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 2 / H2 (ST 26 – 30) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1c	28 111 36	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 3 / H2 (ST 30 – 34) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.
1d	28 111 46	Rahmen FILOU gerade verschweißt Gr. 4 / H2 (ST 34 – 38) kpl. Rahmenquerrohre verschweißt, Rahmenhöhe H2 FM: ? SB: ?	1 St.

**Kippsicherung „light“ abgekröpft Alu**


(CODE 2804)

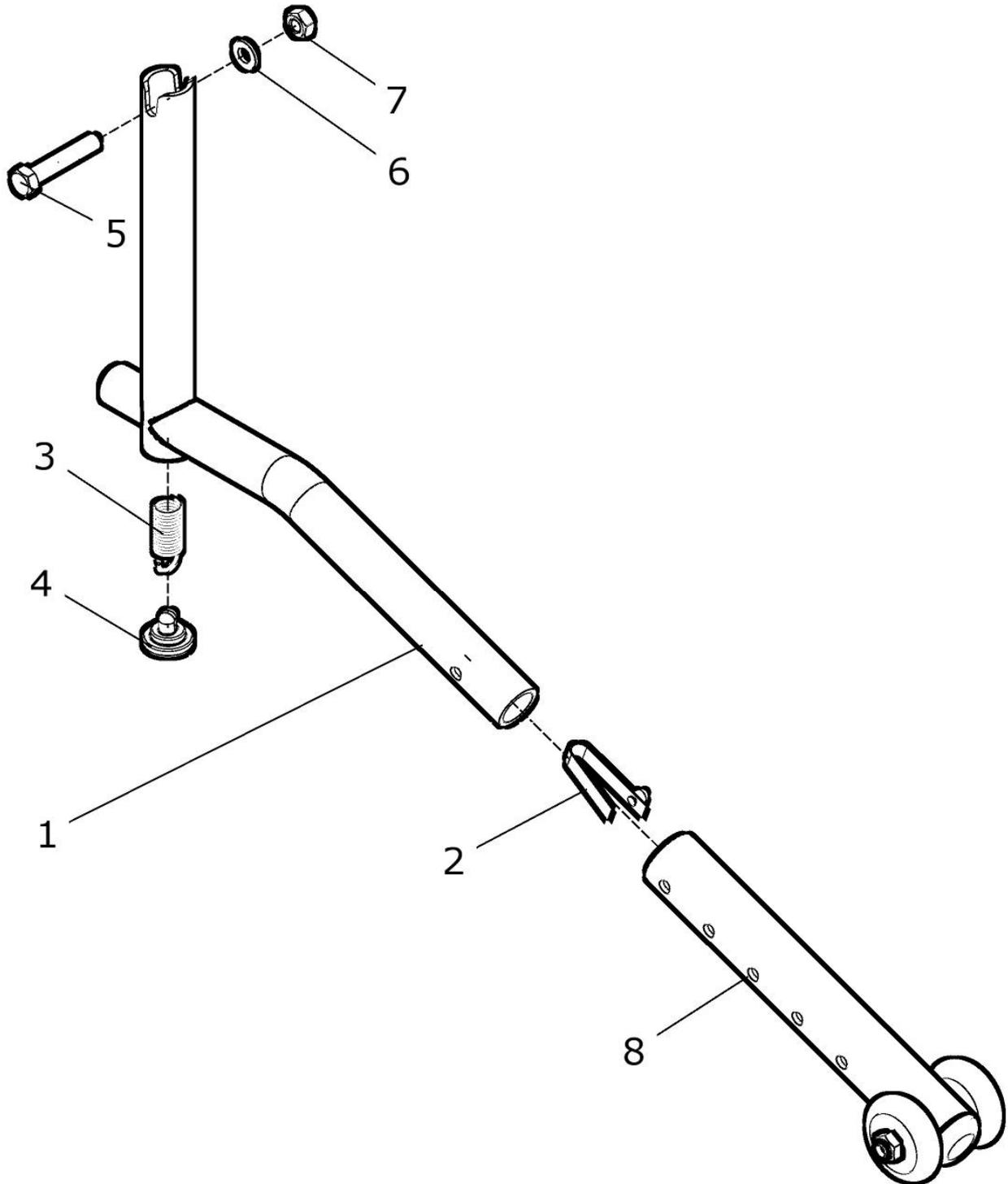

Pos+. -Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8	28 190 00	<b>Kippsicherung „light“ abgekröpft abschwenkbar kpl.</b> aus Aluminium	1 St.
1 - 7	28 192 00	<b>Kippsicherungsadapter „light“ abgekröpft kpl.</b>	1 St.
1	28 192 01	Kippsicherungsadapter abgekröpft Alu („light“)	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 – 7	50 190 10	<b>Montagesatz Kippsicherung kpl.</b>	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	<b>Kippsicherungsrad kpl.</b>	1 St.

Kippsicherung „light“ gerade Alu


(CODE 2804)

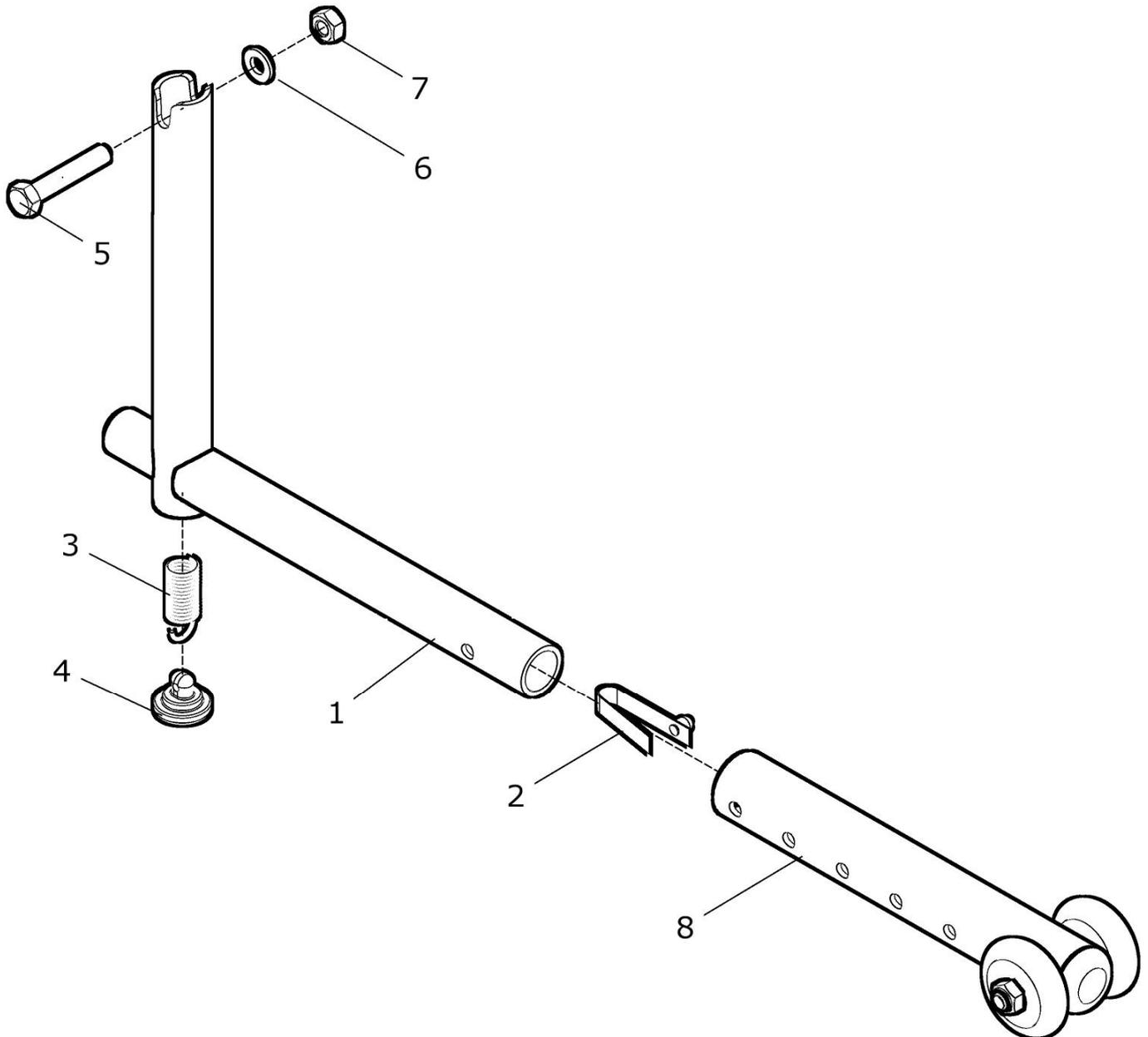

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8	28 190 50	<b>Kippsicherung „light“ gerade abschwenkbar kpl.</b> aus Aluminium	1 St.
1 - 7	28 192 50	<b>Kippsicherungsadapter „light“ gerade kpl.</b>	1 St.
1	28 192 51	Kippsicherungsadapter gerade Alu („light“)	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 - 7	50 190 10	<b>Montagesatz Kippsicherung kpl.</b>	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	<b>Kippsicherungsrad kpl.</b>	1 St.

**Kippsicherung mit Zahnsegment**


(CODE 2212 / 2806)

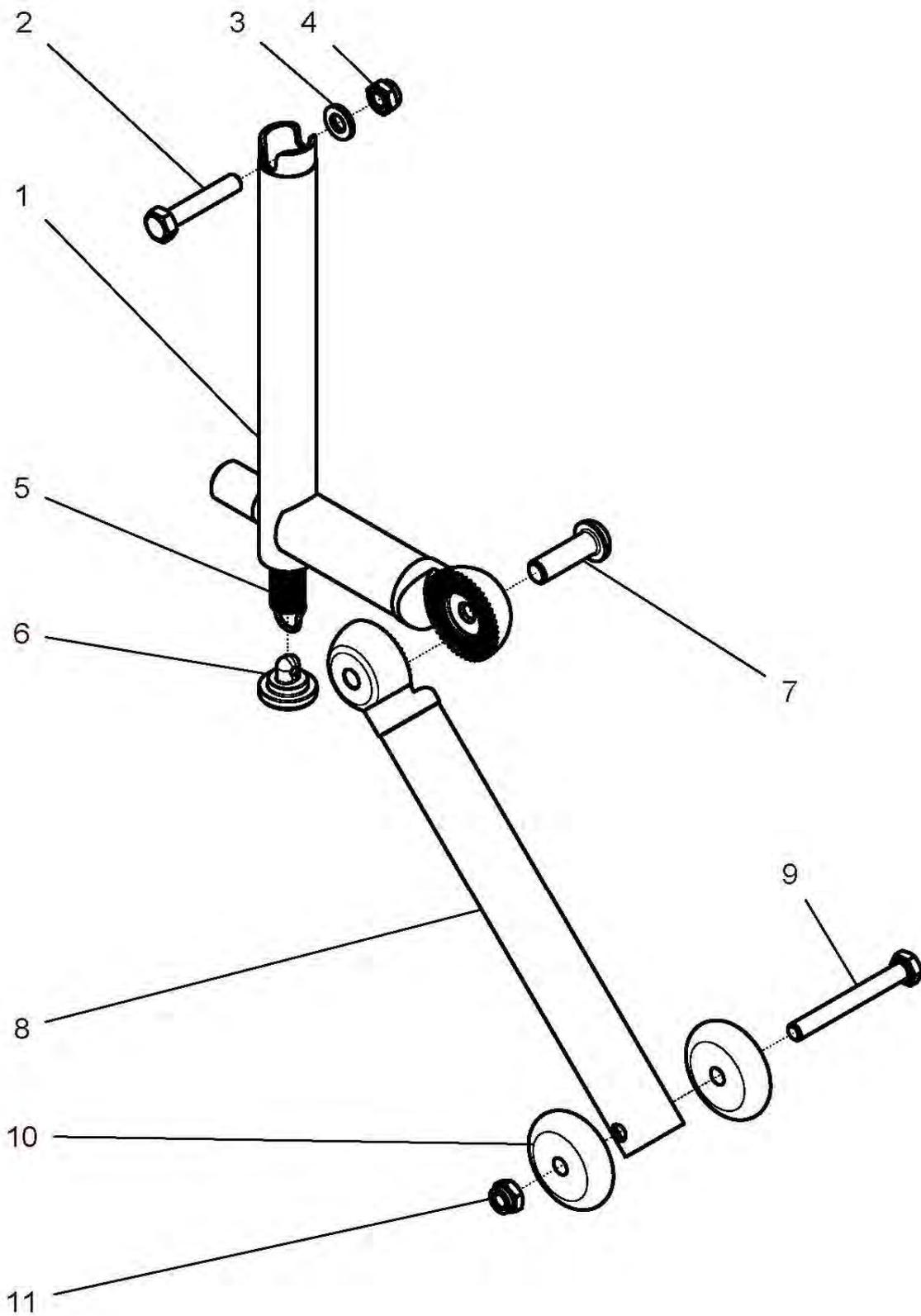

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	25 195 00	<b>Kippsicherung mit Zahnsegment kpl. winkelverstellbar abschwenkbar</b>	1 St.
1	25 195 11	Kippsicherungsadapterträger mit Zahnsegment ø8	1 St.
2	25 195 21	Bolzen M6 / L32	1 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.
5	02 120 01	Zugfeder	1 St.
6	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
7	01 152 40	Linsenkopfschraube M8x25 - ISO 7380	1 St.
8	25 195 12	Kippsicherungsadapterstütze Ø22 mit Zahnsegment M8	1 St.
9	01 110 08	Sechskantschraube M6 x 50 - DIN 931	1 St.
10	50 193 02	Kippsicherungsrad ø35mm	2 St.
11	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	25 195 05	<b>Kippsicherung # kurz # mit Zahnsegment kpl. winkelverstellbar abschwenkbar</b>	1 St.
1	25 195 11	Kippsicherungsadapterträger mit Zahnsegment ø8	1 St.
2	25 195 21	Bolzen M6 / L32	1 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.
5	02 120 01	Zugfeder	1 St.
6	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
7	01 152 40	Linsenkopfschraube M8x25 - ISO 7380	1 St.
8	25 195 15	Kippsicherungsadapterstütze Ø22 #kurz# mit Zahnsegment M8	1 St.
9	01 110 08	Sechskantschraube M6 x 50 - DIN 931	1 St.
10	50 193 02	Kippsicherungsrad ø35mm	2 St.
11	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.

**Kippsicherung mit Zahnsegment und Skaterrolle (ø 63mm) (CODE 2212S)**

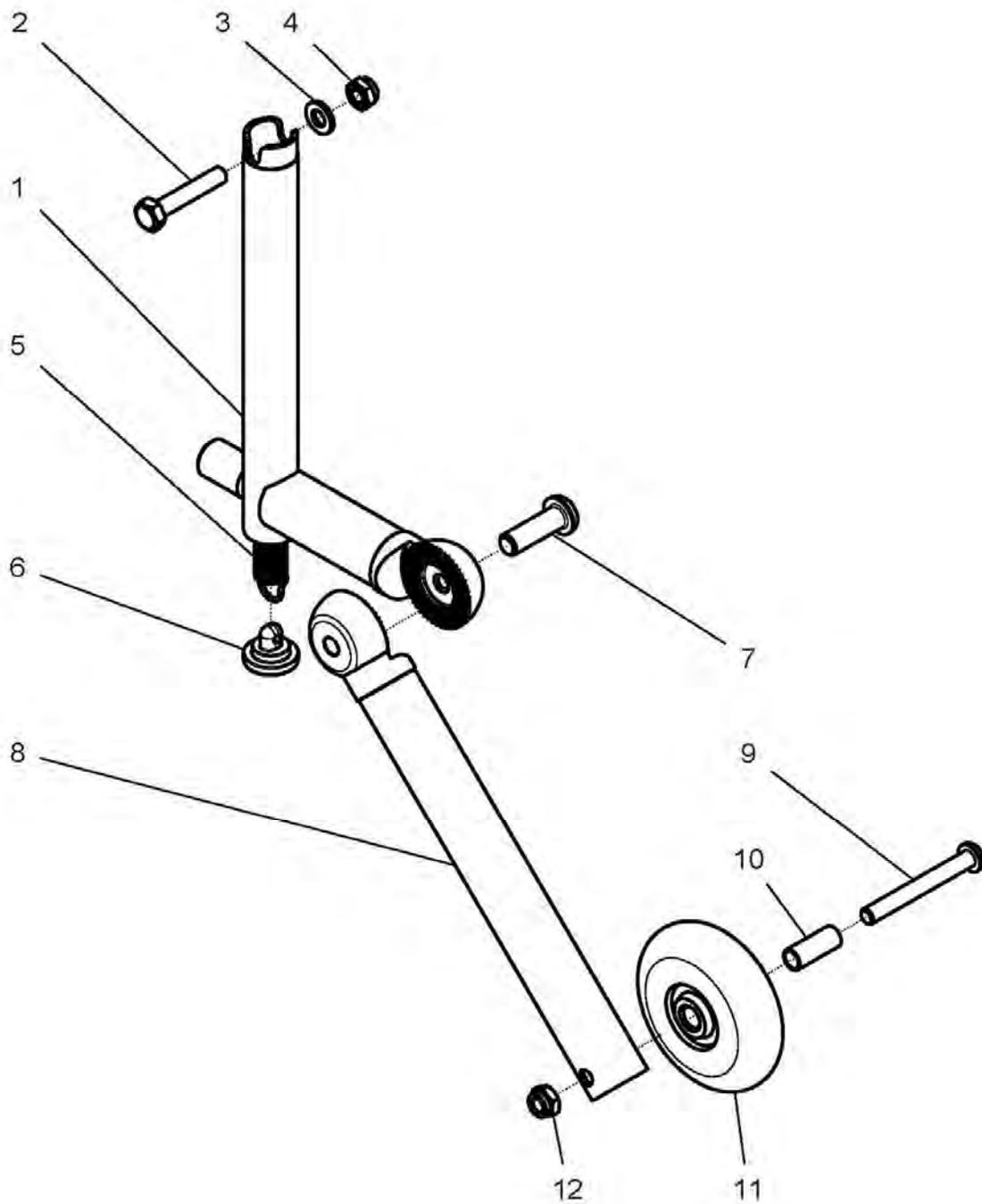

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 12	25 196 00	Kippsicherung mit Zahnsegment und Skater ø63mm kpl. winkeleinstellbar abschwenkbar	1 St.
1	25 195 11	Kippsicherungsadapterträger mit Zahnsegment ø8	1 St.
2	25 195 21	Bolzen M6 / L32	1 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.
5	02 120 01	Zugfeder	1 St.
6	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
7	01 152 40	Linsenkopfschraube M8x25 - ISO7380	1 St.
8	25 195 12	Kippsicherungsadapterstütze Ø22 mit Zahnsegment M8	1 St.
9	01 152 28	Linsenkopfschraube M6x50 - ISO 7380	1 St.
10	U40 211 94	Hülse	1 St.
11	05 201 51	Skaterrolle ø63mm	1 St.
12	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	1 St.

## Ankippbügel

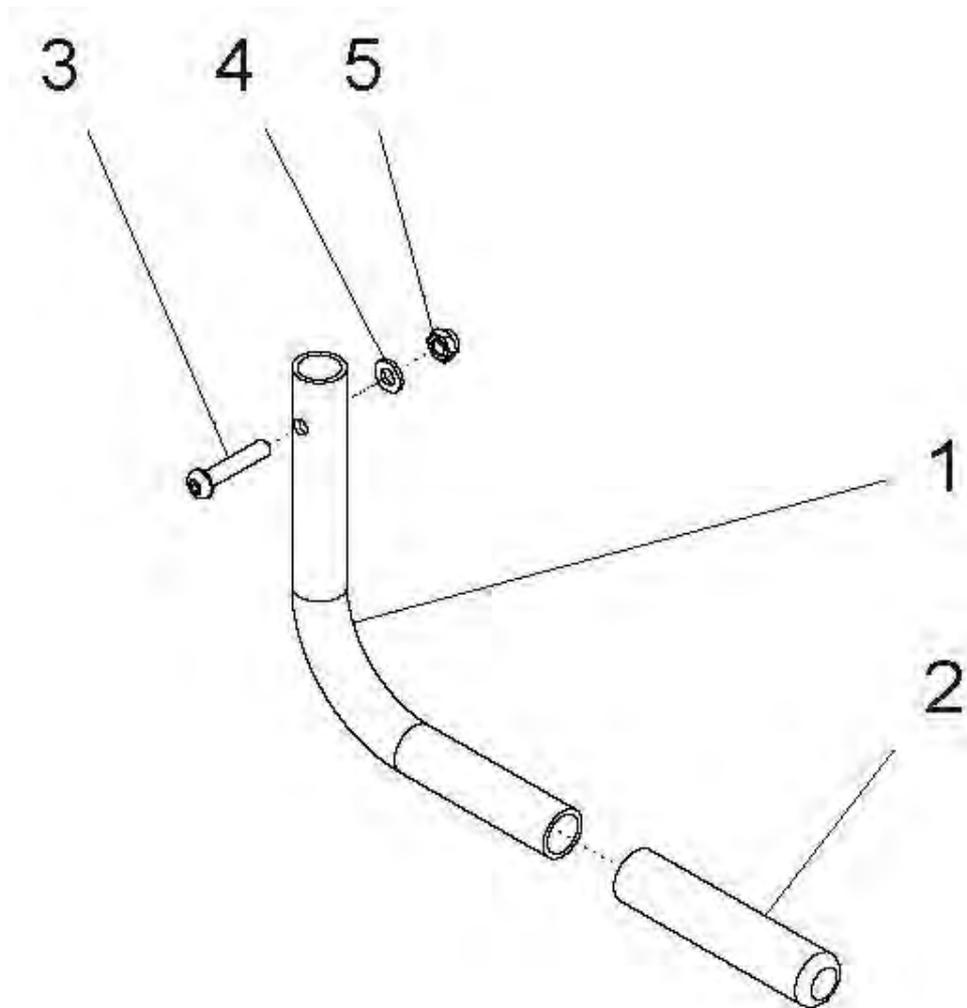


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	50 170 00	Ankippbügel kpl.	1 St.
1	50 172 01	Ankippbügelrohr	1 St.
2	04 201 21	Kappe für Ankippbügel	1 St.
3	01 153 24	Linsenschraube NB 601 M6x30	1 St.
4	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	1 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	1 St.




# Rücken

## Gruppe 2

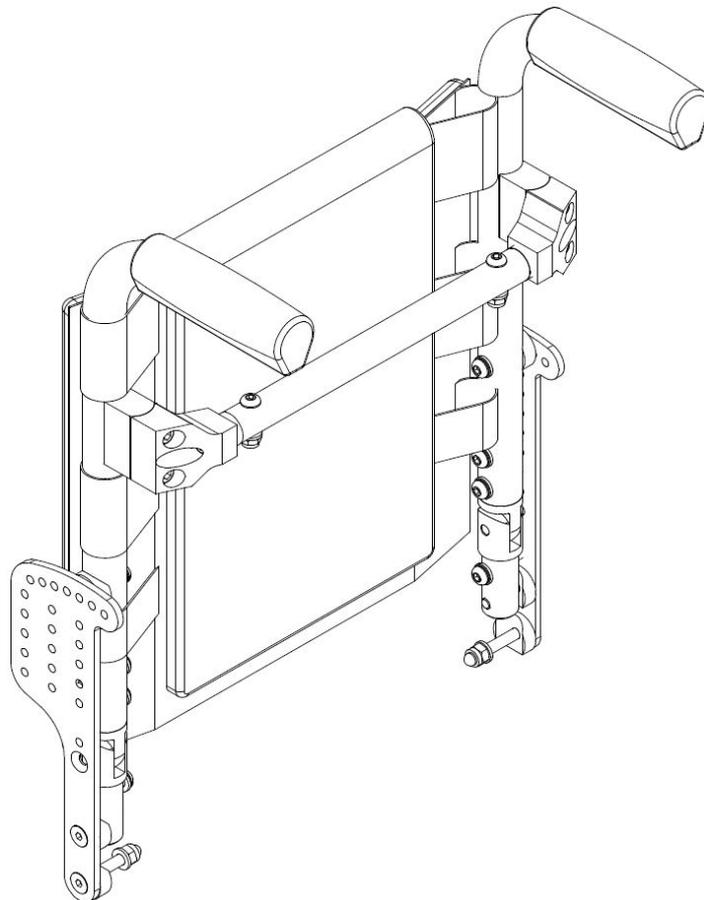

**Rücken anpassbar mit Schiebegriff standard**

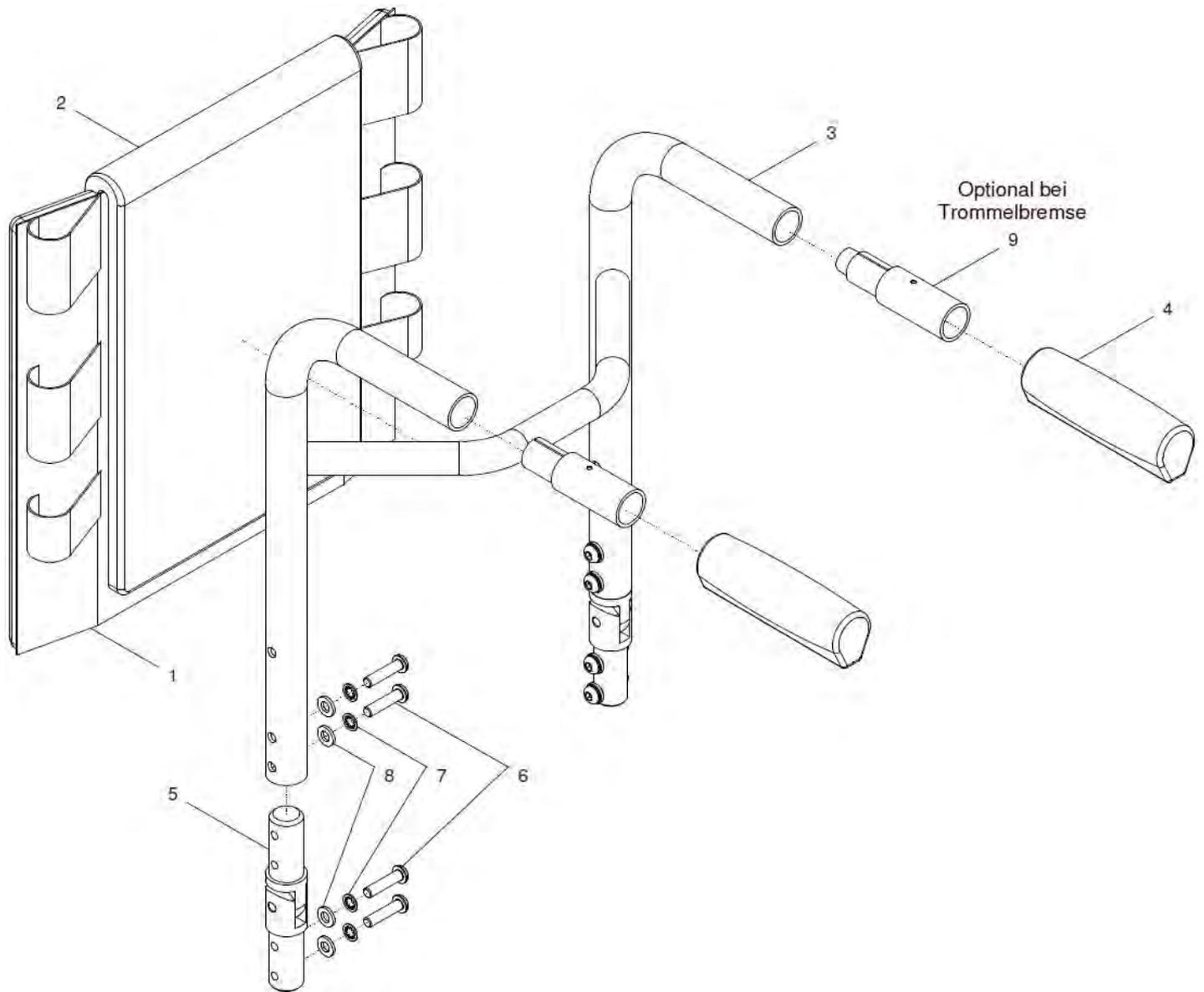


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8 (9)	28 210 00	<b>Rücken FILOU anpassbar mit Schiebegriffen standard kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>mit Schiebegriffen standard</b> FM: ? SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ?	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
3 – 8 (9)	28 210 10	<b>Rücken mit Schiebegriffen standard kpl.</b> <b>(ohne Rückenbespannung)</b> (nicht für Trommelbremsgriffe) FM: ? SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
3 – 9	28 210 15	<b>Rücken mit Schiebegriffen standard für Tr.br. kpl.</b> <b>mit Griffverlängerung für Trommelbremsgriffe</b> <b>(ohne Rückenbespannung)</b> FM: ? SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
3a	28 212 11	Rückengestell RH 20 gerade mit Griff FILOU (ohne Handgriff) FM: ? SB: ? (SB 20 – 38)	2 St.

# FILOU

3b	28 212 21	Rückengestell RH 25 gerade mit Griff FM: ? SB: ? (SB 20 – 38)	FILOU (ohne Handgriff)	2 St.
3c	28 212 31	Rückengestell RH 30 gerade mit Griff FM: ? SB: ? (SB 20 – 38)	FILOU (ohne Handgriff)	2 St.
3d	28 212 41	Rückengestell RH 35 gerade mit Griff FM: ? SB: ? (SB 20 – 38)	FILOU (ohne Handgriff)	2 St.
3e	28 212 51	Rückengestell RH 40 gerade mit Griff FM: ? SB: ? (SB 20 – 38)	FILOU (ohne Handgriff)	2 St.
4	04 200 01	Handgriff		2 St.
5	25 212 10	Rückengelenk d.23 kpl.		2 St.
6	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380		8 St.
7	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6		8 St.
8	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		8 St.
9	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff (bei Trommelbremse)	kpl.	2 St.



**Rücken anpassbar mit Schiebegriff standard bei Kopfstütze**

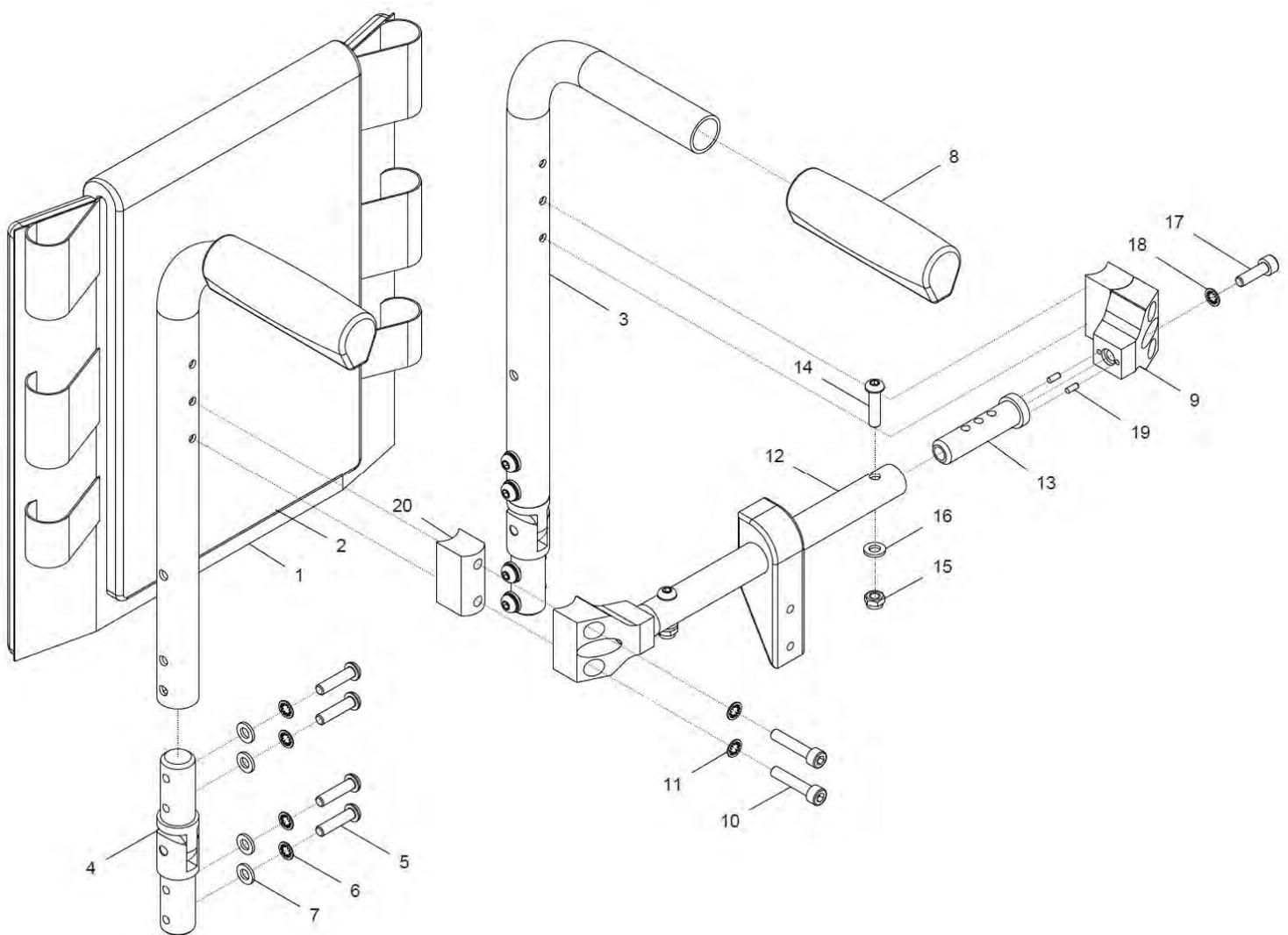

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	28 210 50	<b>Rücken anpassbar m. Schiebegriffen standard f. Kopfstütze kpl. Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig) mit Schiebegriffen standard und Querrohr mit Befestigungsadapter</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ?	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl. (2-teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl. (2-teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
3 - 19	28 210 60	<b>Rücken mit Schiebegriffen standard (bei Kopfstütze) kpl. (ohne Rückenbespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) Trommelbremse: ?	1 St.
3a	25 215 20	Rückenrohr standard RH .. FINDUS / FILOU RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
3b	25 215 30	Rückenrohr standard +5cm RH .. FINDUS / FILOU mit Griffverlängerung 5cm für Trommelbremse RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk d.23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	8 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	04 200 01	Handgriff	2 St.

# FILOU

<b>9 – 19</b>	<b>28 215 10</b>	<b>Querrohr Rücken mit Befestig.adapter für Sch.gr. standard kpl.</b> SB: ?	<b>1 St.</b>
9	25 215 12	Querrohrhalter FINDUS / FILOU (für Rücken Schiebegriffe standard)	2 St.
10a	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
12	25 228 31	Querrohr mit Befestigungsadapter FINDUS / FILOU schwarz SB: ?	1 St.
13	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS / FILOU	2 St.
14	01 153 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
15	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
17	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
18	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
19	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.

## Option:



<b>10b, 11, 20</b>	<b>25 215 05</b>	<b>Versatz Querrohr Rücken FINDUS / FILOU +20mm kpl.</b> (1 Versatzstück pro Rückenrohr)	<b>1 Set</b>
10b	01 160 28	Zylinderkopfschraube M6x50 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
20	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	2 St.

## Option:

<b>10c, 11, 20</b>	<b>25 215 06</b>	<b>Versatz Querrohr Rücken FINDUS / FILOU +40mm kpl.</b> (2 Versatzstücke pro Rückenrohr)	<b>1 Set</b>
10c	01 160 30	Zylinderkopfschraube M6x70 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
20	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	4 St.



**Rücken FILOU anpassbar mit Schiebegriff höhenverstellbar**

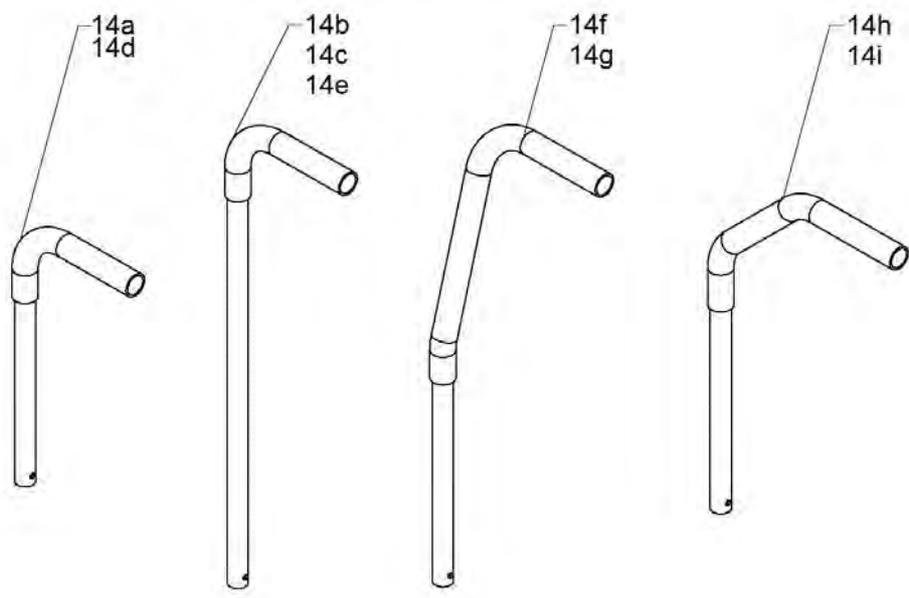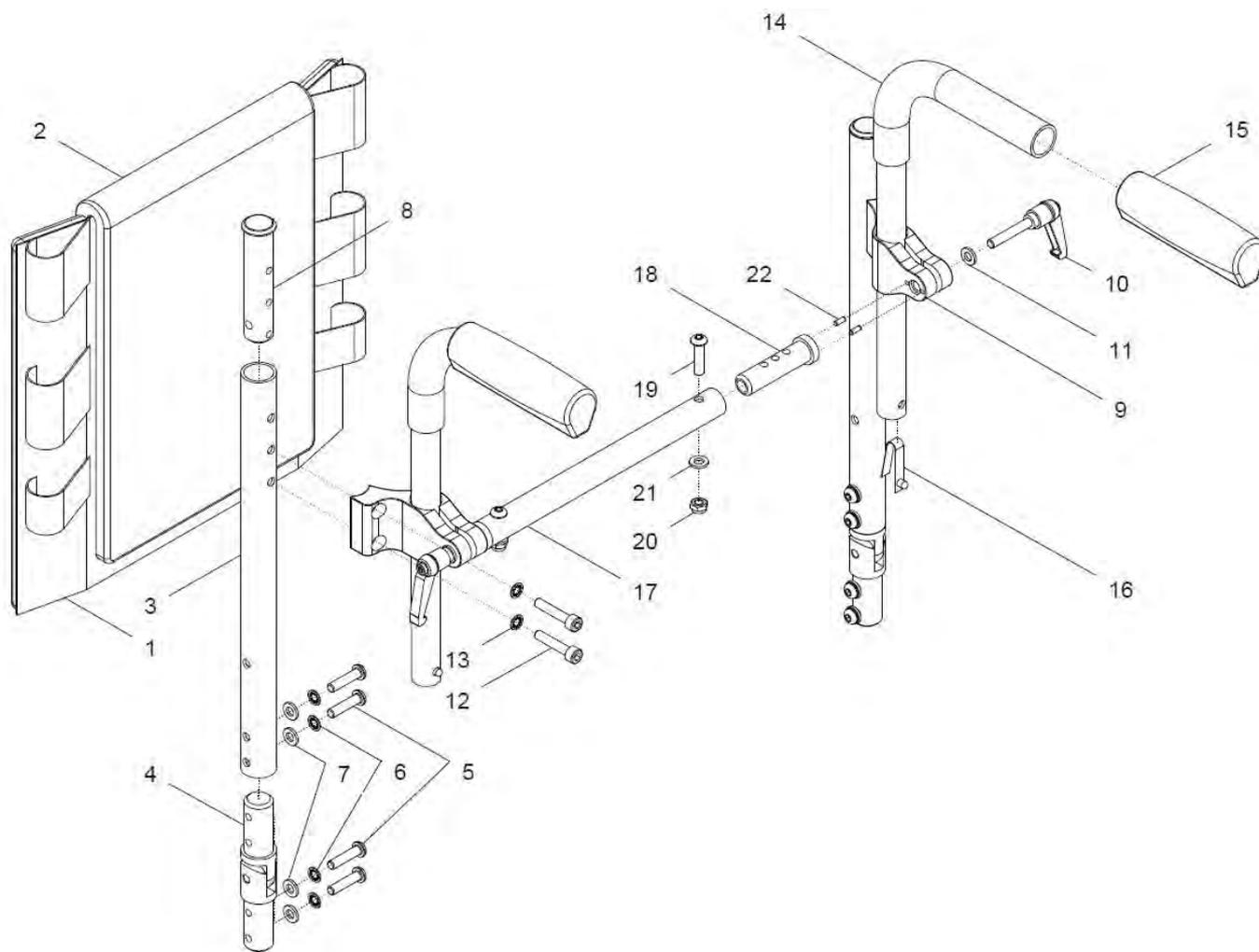


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 22	28 220 00	<b>Rücken FILOU anpassbar mit Schiebegriffen höhenverst. kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>mit Schiebegriffen höhenverstellbar</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...) Schiebegrifftyp: ? Trommelbremse: ?	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
3 - 22	28 220 10	<b>Rücken FILOU Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.</b> <b>mit Schiebegriffen höhenverstellbar</b> <b>(ohne Rückenbespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) Schiebegrifftyp: ? Trommelbremse: ?	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk Ø23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.

<b>9 – 22</b>	<b>25 225 00</b>	<b>Schiebegriffe höhenverstellbar FINDUS mit Schiebegriffhalter FINDUS mit Schiebegriffe höhenverstellbar und Rücken-Querrohr</b> SB: ? Schiebegrifftyp: ? Trommelbremse: ?	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>
<b>9 – 13</b>	<b>25 225 10</b>	<b>Schiebegriffhalter FINDUS mit Klemmhebel M6x35</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
9	25 225 11	Schiebegriffhalter FINDUS		2 St.
10	01 190 07	Klemmhebel klein M6 x 35		2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		2 St.
12	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912		4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6		4 St.
<b>14a – 16</b>	<b>50 225 10</b>	<b>Schiebegriffrohr höhenverstellbar</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14b – 16</b>	<b>50 225 16</b>	<b>Schiebegriffrohr höhenverstellbar lang</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14c – 16</b>	<b>50 225 36</b>	<b>Schiebegriffrohr höhenverstellbar verstärkt 45 extra lang</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14d – 16</b>	<b>50 225 20</b>	<b>Schiebegriffrohr für Trommelbremse</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14e – 16</b>	<b>50 225 26</b>	<b>Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14f – 16</b>	<b>22 225 20</b>	<b>Schiebegriffrohr abgekröpft rechts</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>
<b>14g – 16</b>	<b>22 225 30</b>	<b>Schiebegriffrohr abgekröpft links</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>
<b>14h – 16</b>	<b>22 226 00</b>	<b>Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
<b>14i - 16</b>	<b>22 226 50</b>	<b>Schiebegriffrohr extra lang, nach hinten abgewinkelt</b>	<b>kpl.</b>	<b>2 St.</b>
14a	50 225 11	Schiebegriffrohr	(150mm höhenverstellbar)	2 St.
14b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang	(350mm höhenverstellbar)	2 St.
14c	50 225 39	Schiebegriffrohr verstärkt extra lang	(450mm höhenverstellbar)	2 St.
14d	50 225 21	Schiebegriffrohr Trommelbremse	(150mm höhenverstellbar)	2 St.
14e	50 225 29	Schiebegriffrohr lang Trommelbremse	(350mm höhenverstellbar)	2 St.
14f	22 225 21	Schiebegriffrohr abgekröpft nach außen	rechts	1 St.
14g	22 225 31	Schiebegriffrohr abgekröpft nach außen	links	1 St.
14h	22 226 01	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt	(150mm höhenverstellbar)	2 St.
14i	22 226 51	Schiebegriffrohr extra lang, verstärkt und nach hinten abgewinkelt	(350mm höhenverstellbar)	2 St.
15	04 200 01	Handgriff		2 St.
16	02 320 01	Stativfeder		2 St.
<b>17 – 22</b>	<b>25 225 40</b>	<b>Querrohr Rücken FINDUS</b> SB: ?	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>

## FILOU

17	25 225 50	Querrohr Rücken FINDUS schwarz SB: ?	1 St.
18	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
20	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
22	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.

## Rücken anpassbar mit Schiebegriff höhenverstellbar Trapezbügel

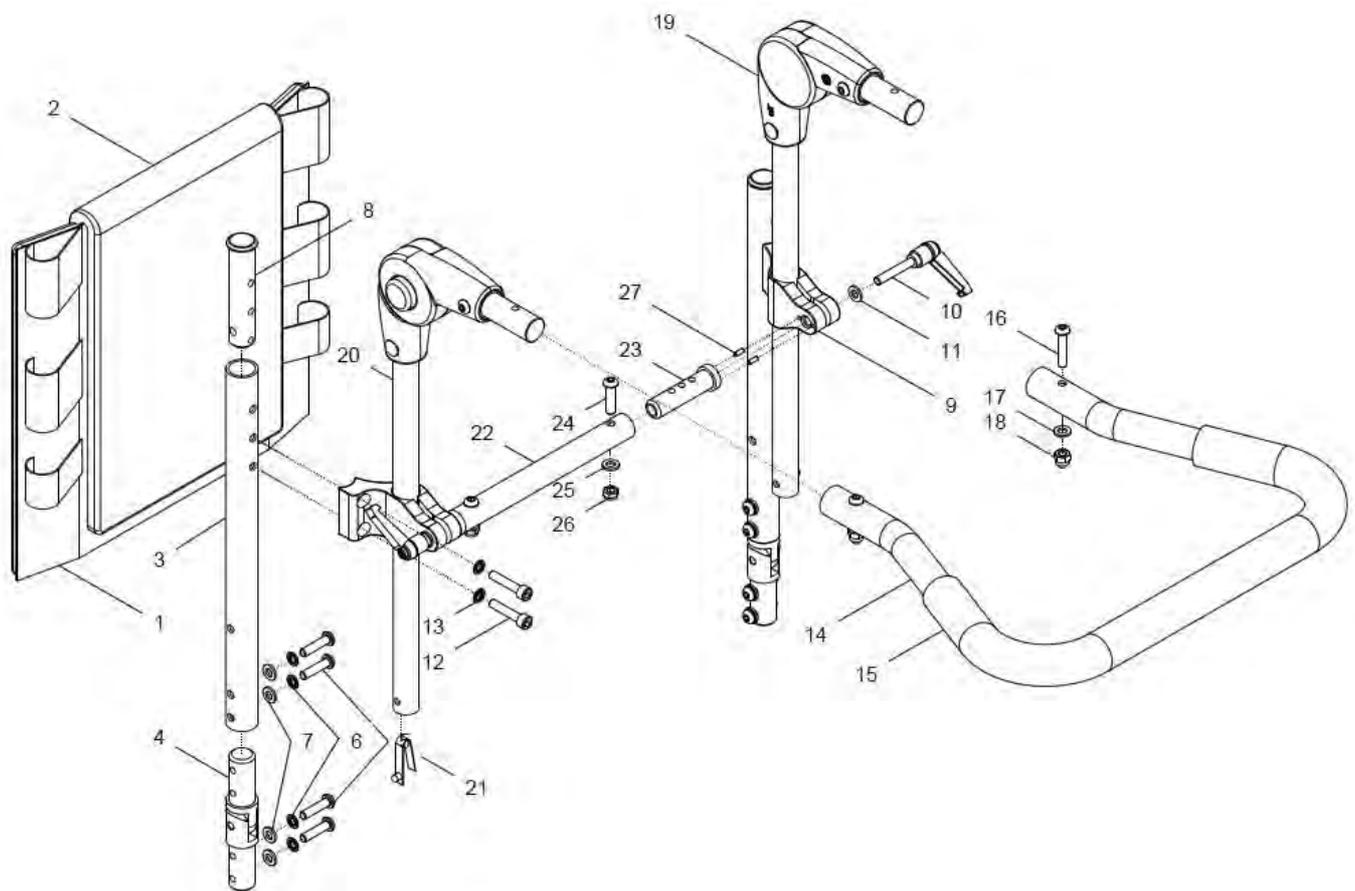

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 27	28 220 70	<b>Rücken FILOU anpassbar mit Trapez-Schiebebügel kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>mit Trapez-Schiebebügel höhenverstellbar und</b> <b>mit Kunststoff-Rastergelenk winkelverstellbar</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...) FM: ? Verstellrohrlänge: ? (350 / 500)	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
3 - 27	28 220 80	<b>Rücken FILOU mit Trapez-Schiebebügel kpl.</b> <b>Rückenrohre mit Trapez-Schiebebügel höhenverstellbar</b> <b>und mit Kunststoff-Rastergelenk winkelverstellbar</b> <b>(ohne Rückenbespannung)</b> SB: ? RH: ? FM: ? Verstellrohrlänge: 350 / 500 ??	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk d.23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.

8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
9 – 27	25 227 80	<b>Trapez-Schiebebügel höhenverstellbar FINDUS kpl.</b> <b>Trapez-Schiebebügel mit Überzug höhenverstellbar</b> <b>und mit Kunststoff-Rastgelenk winkelve</b> <b>stellbar mit Schiebegriffhalter FINDUS und Rücken-Querrohr</b> <b>(ohne Rückenrohre)</b> SB: ? FM: ? Verstellrohrlänge: 350 / 500 ??	1 St.
9 – 13	25 225 10	<b>Schiebegriffhalter FINDUS kpl.</b> mit Klemmhebel und Buchse	2 St.
9	25 225 11	Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
10	01 190 07	Klemmhebel klein M6 x 35	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
14 – 21	25 227 00	<b>Rückenbügel Trapez FINDUS höhenverstellbar kpl.</b> <b>Trapez-Schiebebügel mit Überzug höhenverstellbar</b> <b>und mit Kunststoff-Rastgelenk winkelve</b> <b>stellbar (ohne Schiebegriffhalter)</b> SB: ? FM: ? Verstellrohrlänge: 350 / 500 ??	1 St.
14	25 227 50	Rückenbügel Trapez FINDUS (ohne Rohrüberzug) FM: ? SB: ?	1 St.
15	25 227 60	Rohrüberzug Trapezform Rückenbügel SB: ?	1 St.
16	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
18	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
19a	25 227 20	Verstellrohr 350 mit Rastgelenk Kunststoff rechts kpl.	1 St.
19b	25 227 25	Verstellrohr 500 mit Rastgelenk Kunststoff rechts kpl.	1 St.
20a	25 227 30	Verstellrohr 350 mit Rastgelenk Kunststoff links kpl.	1 St.
20b	25 227 35	Verstellrohr 500 mit Rastgelenk Kunststoff links kpl.	1 St.
21	02 320 01	Stativfeder	2 St.
22 – 27	25 225 40	<b>Querrohr Rücken FINDUS kpl.</b> SB: ?	1 St.
22	25 225 50	Querrohr Rücken FINDUS schwarz SB: ?	1 St.
23	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
24	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
25	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
26	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.


27

01 410 11

Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7

4 St.

**Kopfstütze „Standard“**

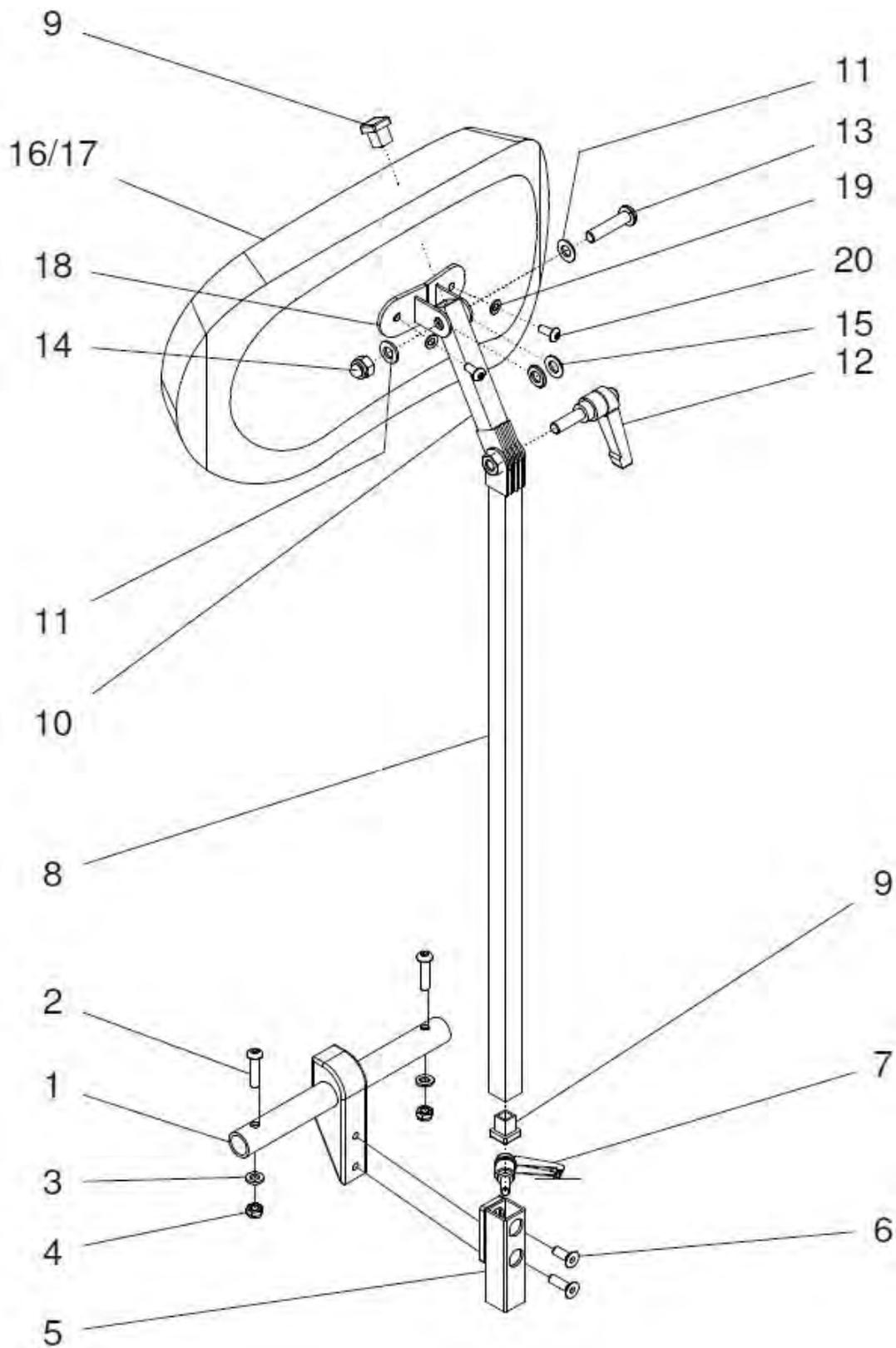


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	25 228 70	<b>Kopfstütze standard für FINDUS kpl.</b> mit Rücken-Querrohr mit Adapter und mit vertikaler Kopfstützenstange und Kopfstütze Muschelform SB: ?	1 St.
1 – 7	25 228 75	<b>Querrohr Rücken für Kopfstütze standard für FINDUS kpl.</b> Rücken-Querrohr mit Adapter mit Halter SB: ?	1 St.
1	25 228 31	Querrohr mit Befestigungsadapter SB: ?	1 St.
2	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
4	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
5 – 20	25 228 80	<b>Kopfstütze standard für FINDUS (ohne Rü.-Querrohr) kpl.</b> mit vertikaler Kopfstützenstange und Kopfstütze Muschelform (ohne Rücken-Querrohr) SB: ?	1 St.
5	25 228 71	Halter für Standard-Kopfstütze	1 St.
6	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	2 St.
7	01 190 08	Klemmhebel klein M8x15	1 St.
8 - 15	20 262 30	<b>Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl.</b> (ohne Kopfstütze Muschelform) SB: ?	1 St.
8a	20 262 24	Kopfstützenträger 500mm (ab SB 38cm) mit Mutter	1 St.
8b	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm (SB 20 - 36cm) mit Mutter	1 St.
9	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
10	20 262 25	Kopfstützenhalterstück 90	1 St.
11	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
12	01 190 02	Klemmhebel M8x25	1 St.
13	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 - ISO 7380 ZNS	1 St.
14	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 ZNS	1 St.
15	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
16a - 20	20 262 20	<b>Kopfstütze Muschelform groß (ab SB 38cm) kpl.</b> mit Bezug und Halter	1 St.
16a	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
17a	20 262 82	Kopfstützenbezug groß schwarz Skai S28	1 St.
18	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
19	01 320 61	Scheibe 5,3 - DIN 125 ZNS	2 St.
20	01 156 54	Linsenkopfschraube M5x12 - ISO 7380F ZNS	2 St.

## FILOU

<b>16b – 20</b>	<b>20 262 50</b>	<b>Kopfstütze Muschelform mini (SB 20 – 36cm) kpl.</b> mit Bezug und Halter	<b>1 St.</b>
16b	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
17b	20 262 87	Kopfstützenbezug mini schwarz Skai S28	1 St.



**Kopfstütze „Light“**

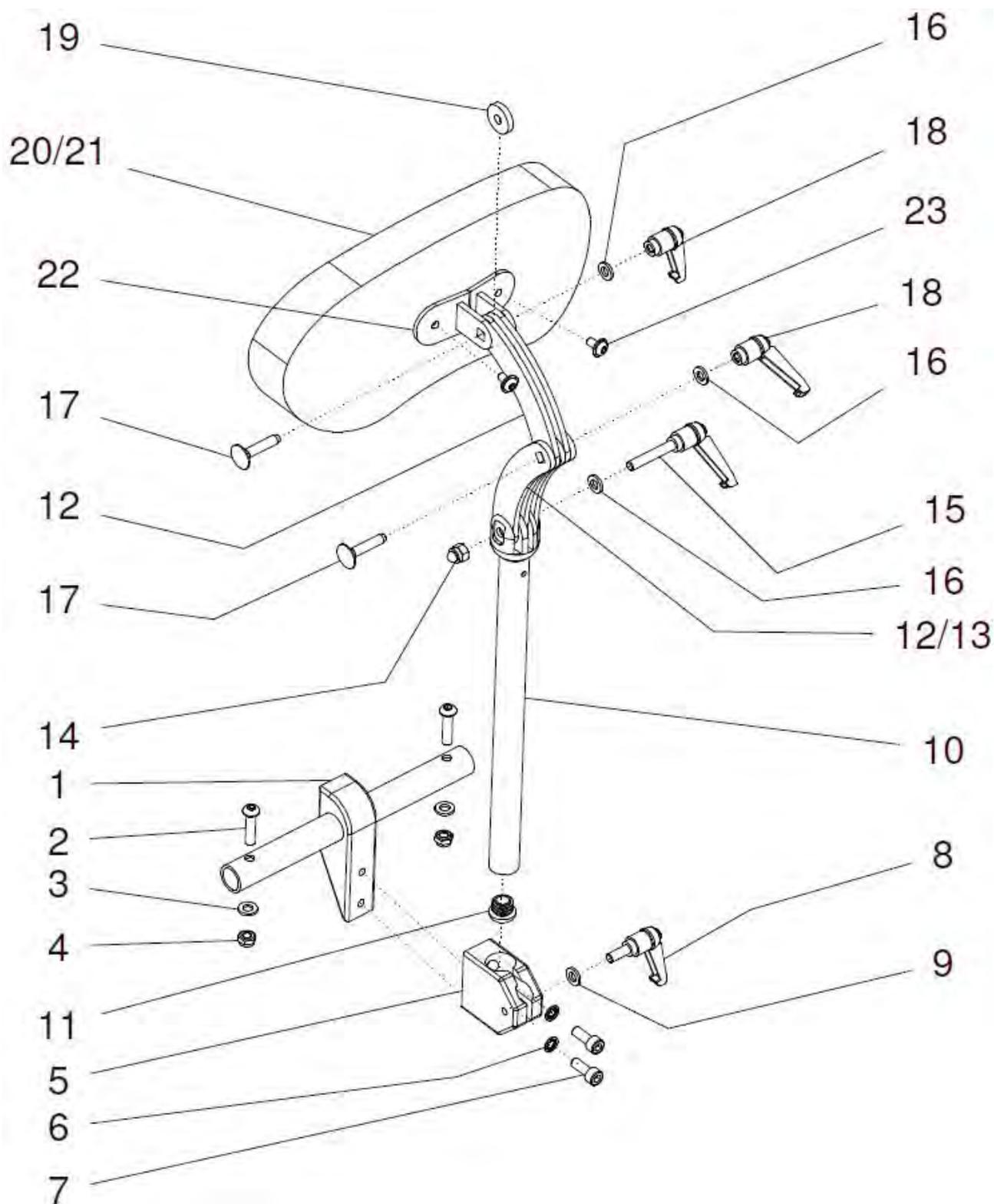

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 23	25 226 70	<b>Kopfstütze „light“ für FINDUS kpl.</b> am Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter ø18,7 mit Kopfstützenstange und Kopfstütze Muschelform mini SB: ? Länge Kopfstützenaufnahme: L: ? (L=250 / L=500)	1 St.
1 – 9	25 228 30	<b>Querrohr Rücken für Monoschiebegriff / Kopfstütze light kpl.</b> Rücken-Querrohr mit Adapter mit Halter Ø18,7 SB: ?	1 St.
1	25 228 31	Querrohr mit Befestigungsadapter SB: ?	1 St.
2	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
4	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
5 – 23	25 226 80	<b>Kopfstütze „light“ für FINDUS ohne Rücken-Querrohr kpl.</b> Halter ø18,7 und mit Kopfstützenstange und Kopfstütze Muschelform mini Länge Kopfstützenaufnahme: L: ? (L=250 / L=500)	1 St.
5 - 9	25 228 35	<b>Halter Ø18,7 für Monoschiebegriff / Kopfstütze light kpl.</b>	1 St.
5	25 228 32	Halter ø18,7 für Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
7	01 160 21	Zylinderkopfschraube M6x16 - DIN 912	2 St.
8	01 190 05	Klemmhebel klein M6x20	1 St.
9	01 320 62	Scheibe 6,4 schwarz - DIN 125	3 St.
10a – 19	29 218 20	<b>Kopfstützenhalter „light“ winkelverstellbar L=500 kpl.</b> mit Kopfstützenaufnahme L=250	1 St.
10b - 19	29 218 60	<b>Kopfstützenhalter „light“ winkelverstellbar L=250 kpl.</b> mit Kopfstützenaufnahme lang L=500	1 St.
10a	29 218 21	Kopfstützenaufnahme L=250	1 St.
10b	29 218 61	Kopfstützenaufnahme lang L=500	1 St.
11	04 210 01	Verschlussstopfen ø19x2	1 St.
12	29 218 32	Bogenlasche innen mit ø6,2	4 St.
13	29 218 31	Bogenlasche außen mit 4-kt	1 St.
14	01 210 73	Hutmutter M6 schwarz - DIN 986	1 St.
15	01 190 07	Klemmhebel klein M6x35	1 St.
16	01 320 62	Scheibe 6,4 schwarz - DIN 125	3 St.
17	01 144 56	Flachrundschraube (Schlossschraube) M6x30 schwarz - DIN 603	2 St.
18	01 190 50	Klemmhebel-Mutter klein M6	2 St.
19	29 218 42	Scheibe ø6,2 x ø20 x 4 PA6 schwarz	1 St.


<b>20 – 23</b>	<b>29 218 50</b>	<b>Kopfstütze Muschelform „light“ mini kpl.</b> mit Bezug und Halter	<b>1 St.</b>
20	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
21	29 218 81	Kopfstützenbezug mini schwarz Stoff 75	1 St.
22	29 218 41	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
23	01 156 54	Linsenkopfschraube M5x12 schwarz - ISO 7380F	2 St.

**Hinweis:**

Bei der Verwendung einer Kopfstütze müssen die Schiebegriffhalter bzw. die Querrohrhalter je Seite mit 2 Versatzstücke montiert werden. Siehe dazu Versatz Querrohr Rücken +40mm unter 2521506.



**Rücken anpassbar mit Monoschiebegriff höhenverstellbar**

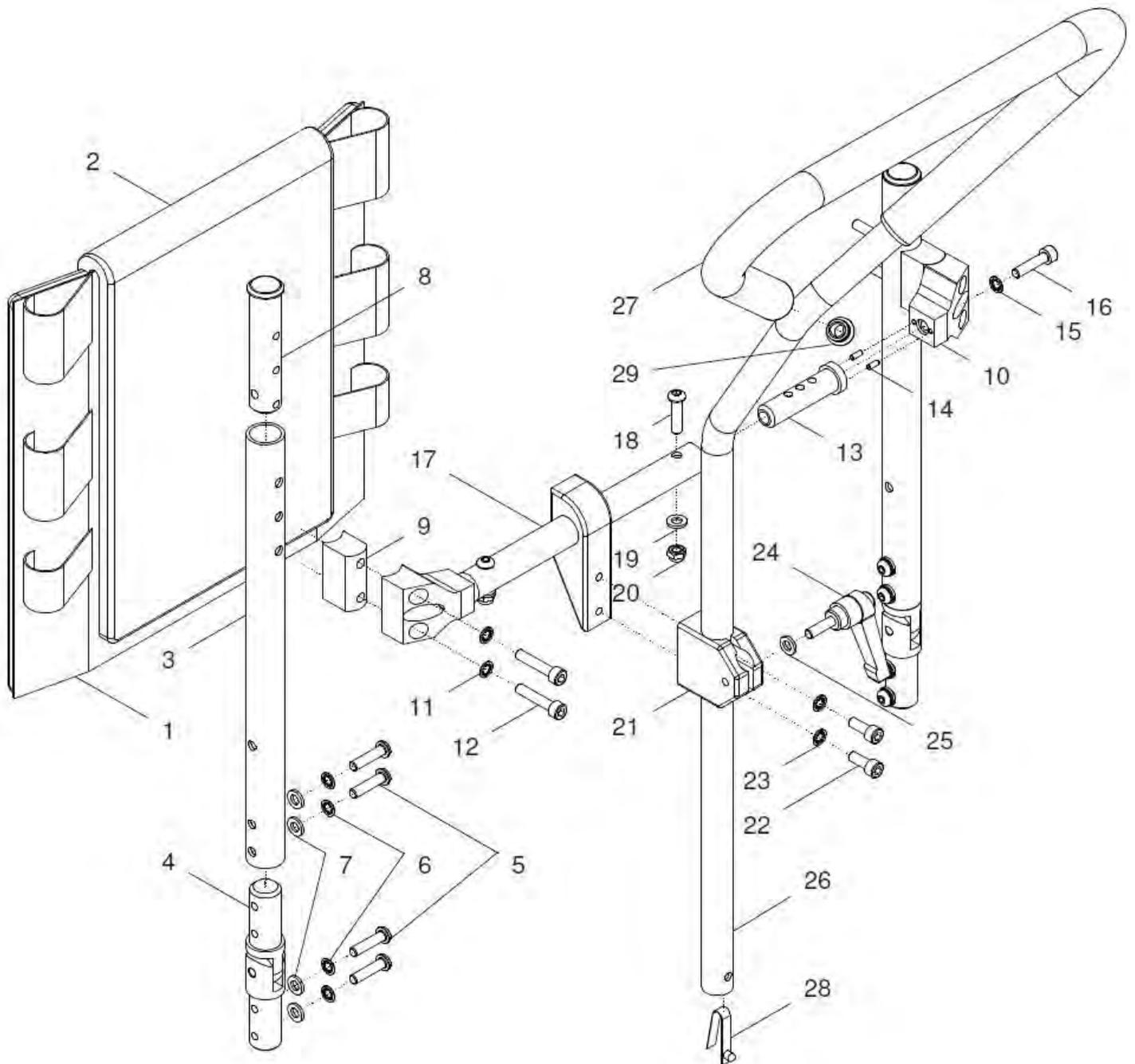


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 29	28 220 20	<b>Rücken FILOU anpassbar mit Monoschiebegriff kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig) mit Mono-Schiebegriff höhenverstellbar</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl. (2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl. (2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk Ø23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
9 - 20	25 228 40	<b>Querrohr Rücken für Monoschiebegriff / Kopfstütze kpl.</b> mit Versatzstück, Querrohrhalter, Rücken-Querbolzen und Querrohr mit Adapter SB: ?	1 St.
9	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	2 St.
10	25 215 12	Querrohrhalter FINDUS	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
12	01 160 28	Zylinderkopfschraube M6x50 - DIN 912	4 St.

13	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
14	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
16	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
<b>17 – 29</b>	<b>25 228 50</b>	<b>Monoschiebegriff FINDUS kpl.</b> mit Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter Ø18,7 SB:	<b>1 St.</b>
<b>17 – 25</b>	<b>25 228 30</b>	<b>Querrohr-Rücken für Monoschiebegriff / Kopfstütze kpl.</b> Rücken-Querrohr mit Adapter und mit Halter Ø18,7 SB:	<b>1 St.</b>
17	25 228 31	Querrohr mit Adapter SB: ?	1 St.
18	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
19	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	2 St.
20	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
<b>29 – 25</b>	<b>25 228 35</b>	<b>Halter Ø18,7 für Monoschiebegriff / Kopfstütze light kpl.</b>	<b>1 St.</b>
21	25 228 32	Halter Ø18,7	1 St.
22	01 160 21	Zylinderkopfschraube M6x16 - DIN 912	2 St.
23	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
24	01 190 05	Klemmhebel klein M6x20	1 St.
25	01 320 62	Scheibe 6,4 schwarz - DIN 125	1 St.
<b>26 – 29</b>	<b>72 222 00</b>	<b>Monoschiebegriff mit Rohrüberzug Ø18,7 kpl.</b> mit Rohrüberzug und Stativfeder	<b>1 St.</b>
26	72 222 01	Monoschiebegriffrohr ø18,7 (ohne Rohrüberzug/ ohne Stativfeder)	1 St.
27	72 222 05	Rohrüberzug für Monoschiebegriff	1 St.
28	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
29	04 210 01	Verschlussstopfen ø19	1 St.



**Rücken anpassbar mit Monoschiebegriff höhenverstellbar und  
Kopfstütze „Standard“**

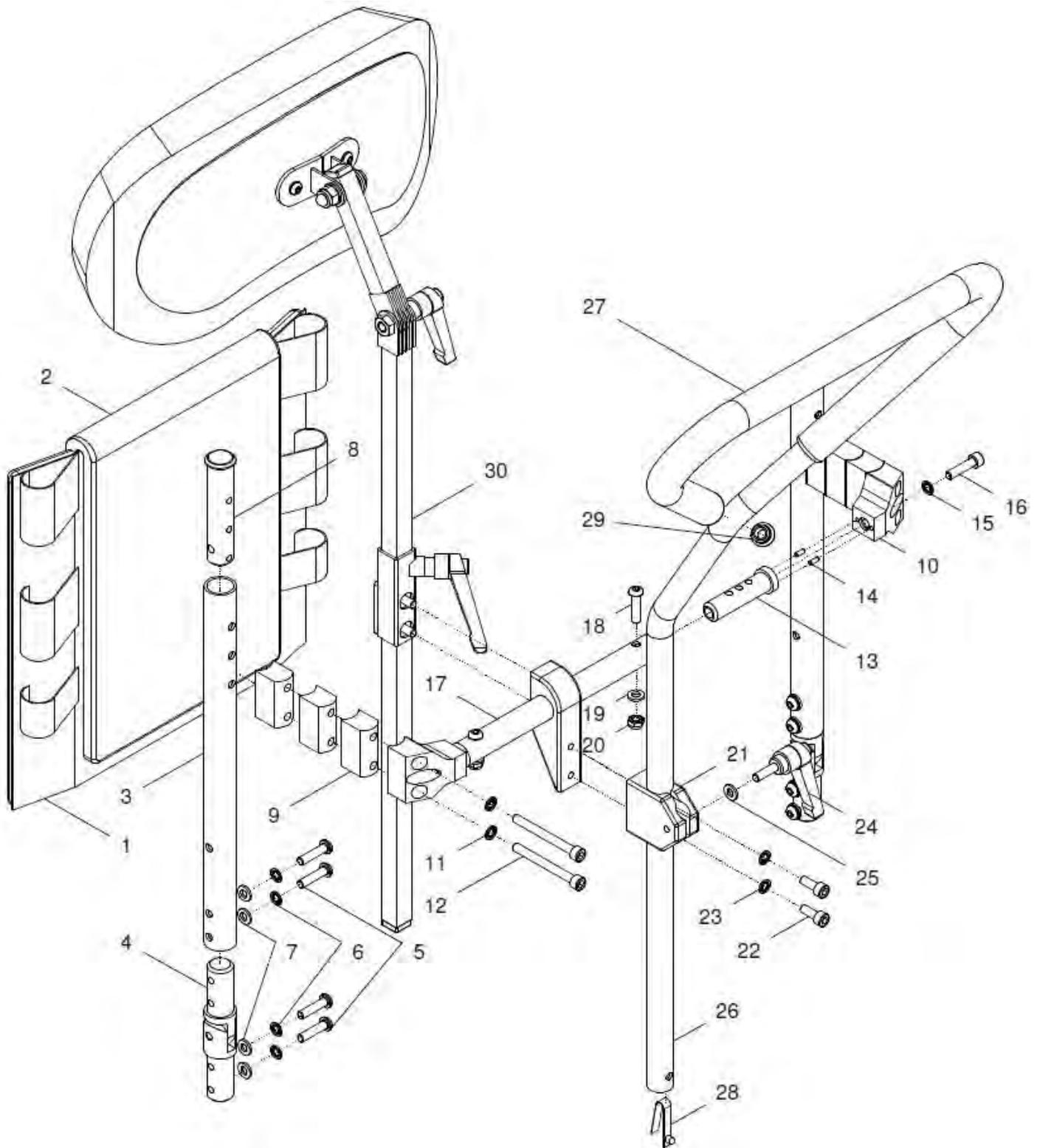


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 30	28 220 22	<b>Rücken anpassbar, Monoschiebegriff + Kopfstütze stand. kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>mit Mono-Schiebegriff höhenverstellbar und</b> <b>mit Kopfstütze „STANDARD“</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk Ø23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
9 – 20	25 228 45	<b>Querrohr Rücken für Monoschiebegriff mit Kopfstütze kpl.</b> Querrohr mit Adapter und mit Rücken-Querbolzen und mit Querrohrhalter und je Seite 3x Versatzstück SB: ?	1 St.
9	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	6 St.
10	25 215 12	Querrohrhalter FINDUS	2 St.

11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
12	01 160 31C	Zylinderkopfschraube M6x90 - DIN 912	4 St.
13	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
14	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
16	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
<b>17 - 30</b>	<b>25 228 00</b>	<b>Monoschiebegriff mit Kopfstütze standard mit Halter kpl.</b> Monoschiebegriff mit Kopfstütze Muschelform, mit Kopfstützenhalter winkelverstellbar, mit Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter Ø18,7 SB: ? Kopfstützenbezug: Skai S28 schwarz	<b>1 St.</b>
<b>17 - 29</b>	<b>25 228 50</b>	<b>Monoschiebegriff FINDUS kpl.</b> mit Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter Ø18,7 (ohne Kopfstütze) SB:	<b>1 St.</b>
<b>17 - 25</b>	<b>25 228 30</b>	<b>Querrohr-Rücken für Monoschiebegriff / Kopfstütze kpl.</b> Rücken-Querrohr mit Adapter und mit Halter Ø18,7 SB:	<b>1 St.</b>
17	25 228 31	Querrohr mit Adapter SB: ?	1 St.
18	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
19	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	2 St.
20	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
<b>21 - 25</b>	<b>25 228 35</b>	<b>Halter Ø18,7 für Monoschiebegriff / Kopfstütze light kpl.</b>	<b>1 St.</b>
21	25 228 32	Halter Ø18,7	1 St.
22	01 160 21	Zylinderkopfschraube M6x16 - DIN 912	2 St.
23	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
24	01 190 05	Klemmhebel klein M6x20	1 St.
25	01 320 62	Scheibe 6,4 schwarz - DIN 125	1 St.
<b>26 - 29</b>	<b>72 222 00</b>	<b>Monoschiebegriff mit Rohrüberzug Ø18,7 kpl.</b> mit Rohrüberzug und Stativfeder	<b>1 St.</b>
26	72 222 01	Monoschiebegriffrohr Ø18,7 (ohne Rohrüberzug/ ohne Stativfeder)	1 St.
27	72 222 05	Rohrüberzug für Monoschiebegriff	1 St.
28	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
29	04 210 01	Verschlussstopfen ø19	1 St.
<b>30</b>	<b>25 228 80</b>	<b>Kopfstütze standard mit Halter FINDUS kpl.</b> Kopfstütze Muschelform mit vertikalem Kopfstützenhalter winkelverstellbar und mit Halter (ohne Rücken-Querrohr) SB: ? Kopfstützenbezug: Skai S28 schwarz	<b>1 St.</b>



**Rücken anpassbar mit Monoschiebegriff höhenverstellbar und  
Kopfstütze „Light“**

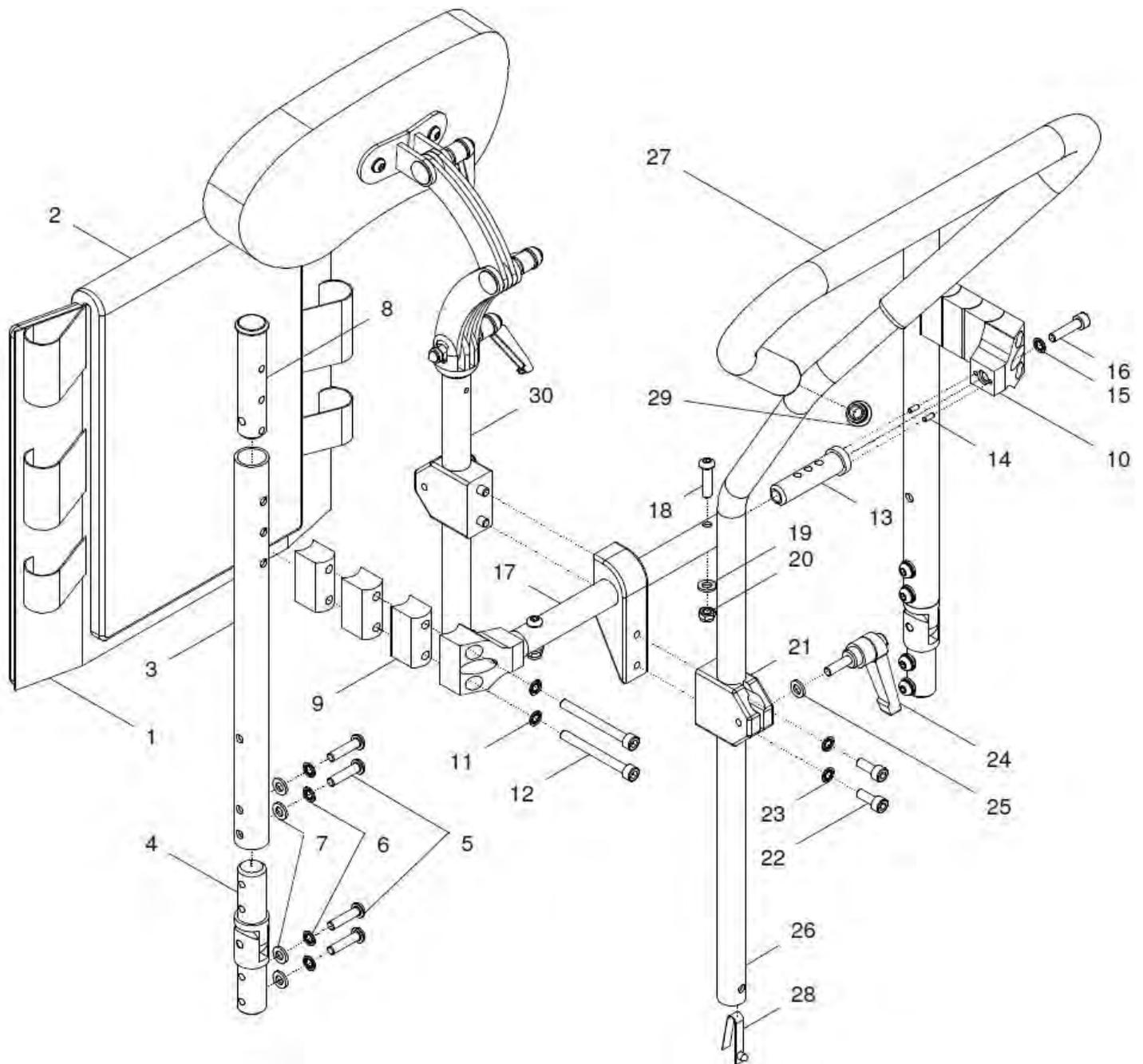


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 30	28 220 24	<b>Rücken anpassbar, Monoschiebegriff + Kopfstütze „light“ kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>mit Mono-Schiebegriff höhenverstellbar und</b> <b>mit Kopfstütze „light“</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff)	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk Ø23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
9 – 20	25 228 45	<b>Querrohr Rücken für Monoschiebegriff mit Kopfstütze kpl.</b> Querrohr mit Adapter und mit Rücken-Querbolzen und mit Querrohrhalter und je Seite 3x Versatzstück SB: ?	1 St.
9	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	6 St.
10	25 215 12	Querrohrhalter FINDUS	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.

12	01 160 31C	Zylinderkopfschraube M6x90 - DIN 912	4 St.
13	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
14	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
16	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
<b>17 - 30</b>	<b>25 228 01</b>	<b>Monoschiebegriff mit Kopfstütze „light“ mit Halter kpl.</b> Monoschiebegriff mit Kopfstütze „light“ Muschelform mini, mit Kopfstützenhalter winkelverstellbar, mit Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter Ø18,7 SB: ? Kopfstützenbezug mini: schwarz Stoff 75 Länge Kopfstützenaufnahme: L: ? (L=250 / L=500)	<b>1 St.</b>
<b>17 – 29</b>	<b>25 228 50</b>	<b>Monoschiebegriff FINDUS kpl.</b> mit Rücken-Querrohr mit Adapter und Halter Ø18,7 (ohne Kopfstütze) SB:	<b>1 St.</b>
<b>17 – 25</b>	<b>25 228 30</b>	<b>Querrohr-Rücken für Monoschiebegriff / Kopfstütze kpl.</b> Rücken-Querrohr mit Adapter und mit Halter Ø18,7 SB:	<b>1 St.</b>
17	25 228 31	Querrohr mit Adapter SB: ?	1 St.
18	01 153 23	Linsenschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
19	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	2 St.
20	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
<b>21 – 25</b>	<b>25 228 35</b>	<b>Halter Ø18,7 für Monoschiebegriff / Kopfstütze light kpl.</b>	<b>1 St.</b>
21	25 228 32	Halter Ø18,7	1 St.
22	01 160 21	Zylinderkopfschraube M6x16 - DIN 912	2 St.
23	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
24	01 190 05	Klemmhebel klein M6x20	1 St.
25	01 320 62	Scheibe 6,4 schwarz - DIN 125	1 St.
<b>26 – 29</b>	<b>72 222 00</b>	<b>Monoschiebegriff mit Rohrüberzug Ø18,7 kpl.</b> mit Rohrüberzug und Stativfeder	<b>1 St.</b>
26	72 222 01	Monoschiebegriffrohr Ø18,7 (ohne Rohrüberzug/ ohne Stativfeder)	1 St.
27	72 222 05	Rohrüberzug für Monoschiebegriff	1 St.
28	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
29	04 210 01	Verschlussstopfen Ø19	1 St.
<b>30</b>	<b>25 226 80</b>	<b>Kopfstütze „light“ mit Halter Ø18,7 kpl.</b> Kopfstütze „light“ Muschelform mini mit vertikalem Kopfstützenhalter winkelverstellbar und mit Halter Ø18,7 (ohne Rücken-Querrohr) SB: ? Kopfstützenbezug: Stoff 75 schwarz Länge Kopfstützenaufnahme: L: ? (L=250 / L=500)	<b>1 St.</b>



**Rücken FILOU anpassbar ohne Schiebegriffe**

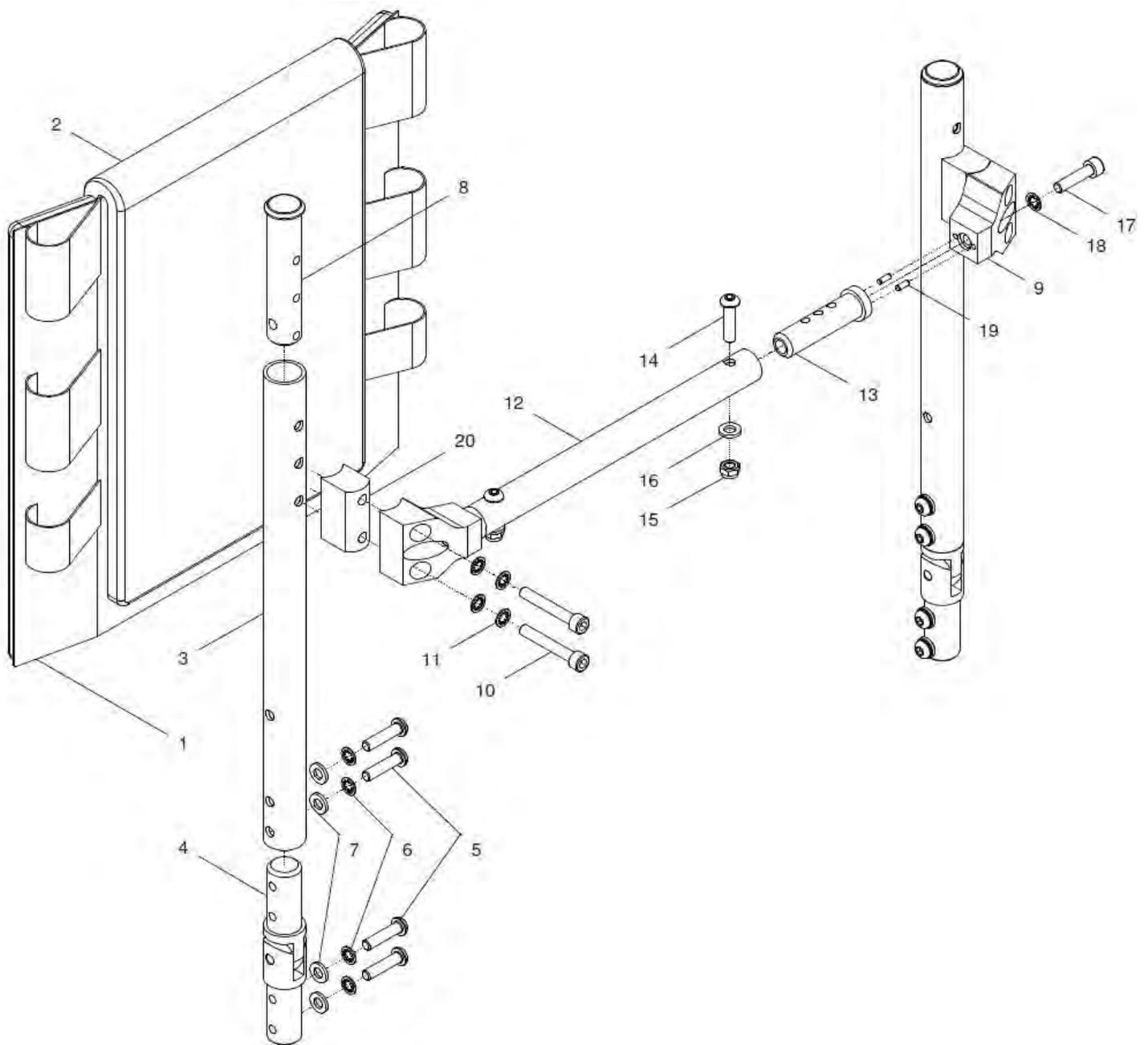

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	28 230 00	<b>Rücken FILOU anpassbar ohne Schiebegriffe kpl.</b> <b>Rückenbespannung anpassbar (2 - teilig)</b> <b>ohne Schiebegriffe</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1a – 2a	25 223 00	<b>Rückenbespannung anpassbar FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
1b – 2b	25 223 05	<b>Rückenbespannung anpassbar SLIMLINE FINDUS / FILOU kpl.</b> <b>(2 teilige Bespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
1	25 223 02	Rückenbespannungsträger FINDUS / FILOU schwarz SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2a	25 223 01	Rückenüberwurf FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: standard ST ... oder AGW-Stoff ...)	1 St.
2b	25 223 06	Rückenüberwurf SLIMLINE FINDUS / FILOU SB: ? (SB 20 – 38) RH: ? (RH 20 – 40) FB innen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff) FB außen: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff)	1 St.
3 - 19	28 230 10	<b>Rücken FILOU ohne Schiebegriffe kpl.</b> <b>Rückenrohre mit Gelenke und Querrohrhalter mit Querrohr</b> <b>(ohne Rückenbespannung)</b> SB: ? (SB 20 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
3	25 211 10	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 20 – 40)	2 St.
4	25 212 10	Rückengelenk Ø23 kpl.	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	6 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter FINDUS	2 St.
9 – 19	25 215 10	<b>Querrohr Rücken für Rücken Schiebegriffe standard kpl.</b> SB: ?	1 St.
9	25 215 12	Querrohrhalter FINDUS (für Rücken Schiebegriffe standard)	2 St.

# FILOU

10a	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
<b>12 – 19</b>	<b>25 225 40</b>	<b>Querrohr Rücken FINDUS kpl.</b> SB: ?	<b>1 St.</b>
12	25 225 50	Querrohr Rücken FINDUS schwarz SB: ?	1 St.
13	25 225 12	Rücken-Querbolzen FINDUS	2 St.
14	01 153 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
15	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
17	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
18	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	2 St.
19	01 410 11	Zylinderstift Ø3 x 8 - DIN 7	4 St.

## Option:


<b>10b, 11, 20</b>	<b>25 225 05</b>	<b>Versatz Schiebegriffhalter FINDUS / FILOU +20mm kpl.</b> (1 Versatzstück pro Schiebegriffhalter)	<b>1 Set</b>
10b	01 160 28	Zylinderkopfschraube M6x50 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
20	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	2 St.

## Option:

<b>10c, 11, 20</b>	<b>25 225 06</b>	<b>Versatz Schiebegriffhalter FINDUS / FILOU +40mm kpl.</b> (2 Versatzstücke pro Schiebegriffhalter)	<b>1 Set</b>
10c	01 160 30	Zylinderkopfschraube M6x70 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
20	25 225 21	Versatzstück 20mm Schiebegriffhalter	4 St.




**Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - angeschraubt**

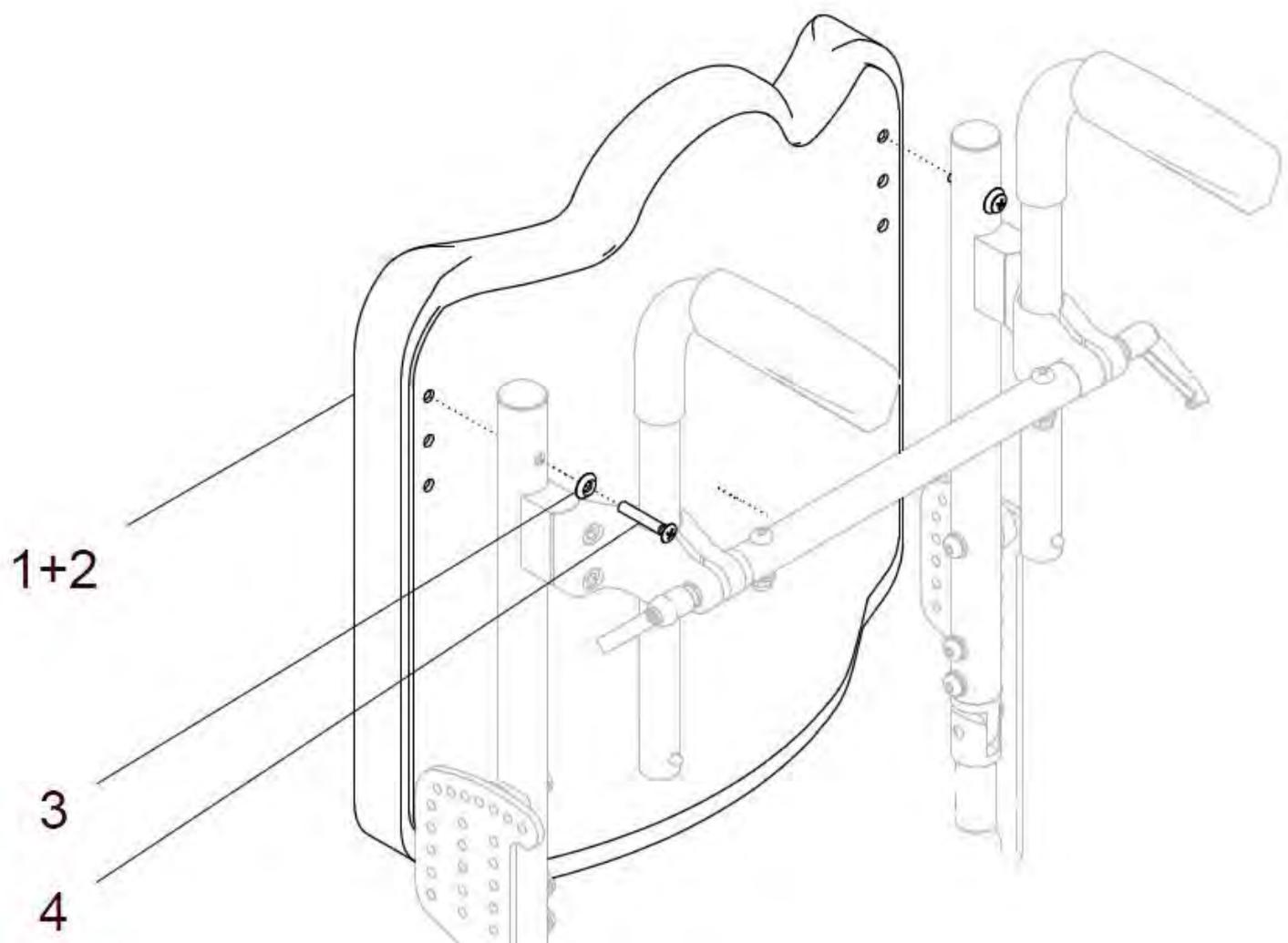


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	25 230 00	<b>Rücken FIDIBUS angeschraubt kpl.</b> <b>anatomisch geformter Rücken FIDIBUS</b> <b>mit atmungsaktivem Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1	25 231 00	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS angeschraubt (ohne Bezug) SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2	25 231 81	Bezug für Rücken FIDIBUS angeschraubt SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
3	01 350 02	Rosette ø5,3 - DIN 17670	2 St.
4a	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - ISO 7047 A2	2 St.
4b	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - ISO 7047 A2 (Nur bei Verwendung von fest angeschraubten Seitenpelotten)	2 St.

**Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - mit Clips**

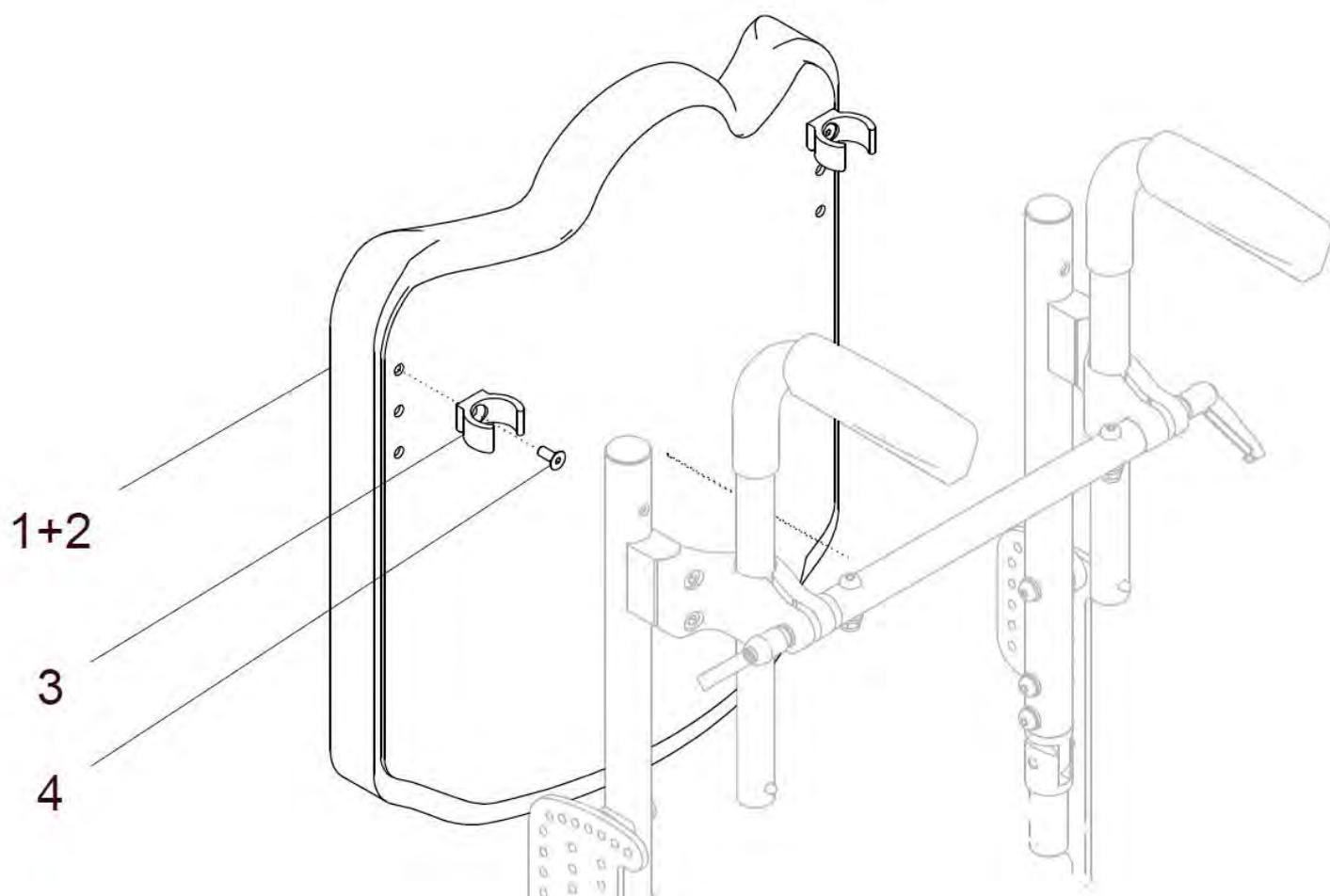


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	25 230 50	<b>Rücken FIDIBUS mit Clips kpl.</b> <b>anatomisch geformter Rücken FIDIBUS</b> <b>mit atmungsaktivem Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1	25 231 00	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS (ohne Bezug) SB: ? (SB 20 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2	25 231 81	Bezug für Rücken FIDIBUS angeschraubt SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
3	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb	2 St.
4	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2	2 St.

## Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - ASR

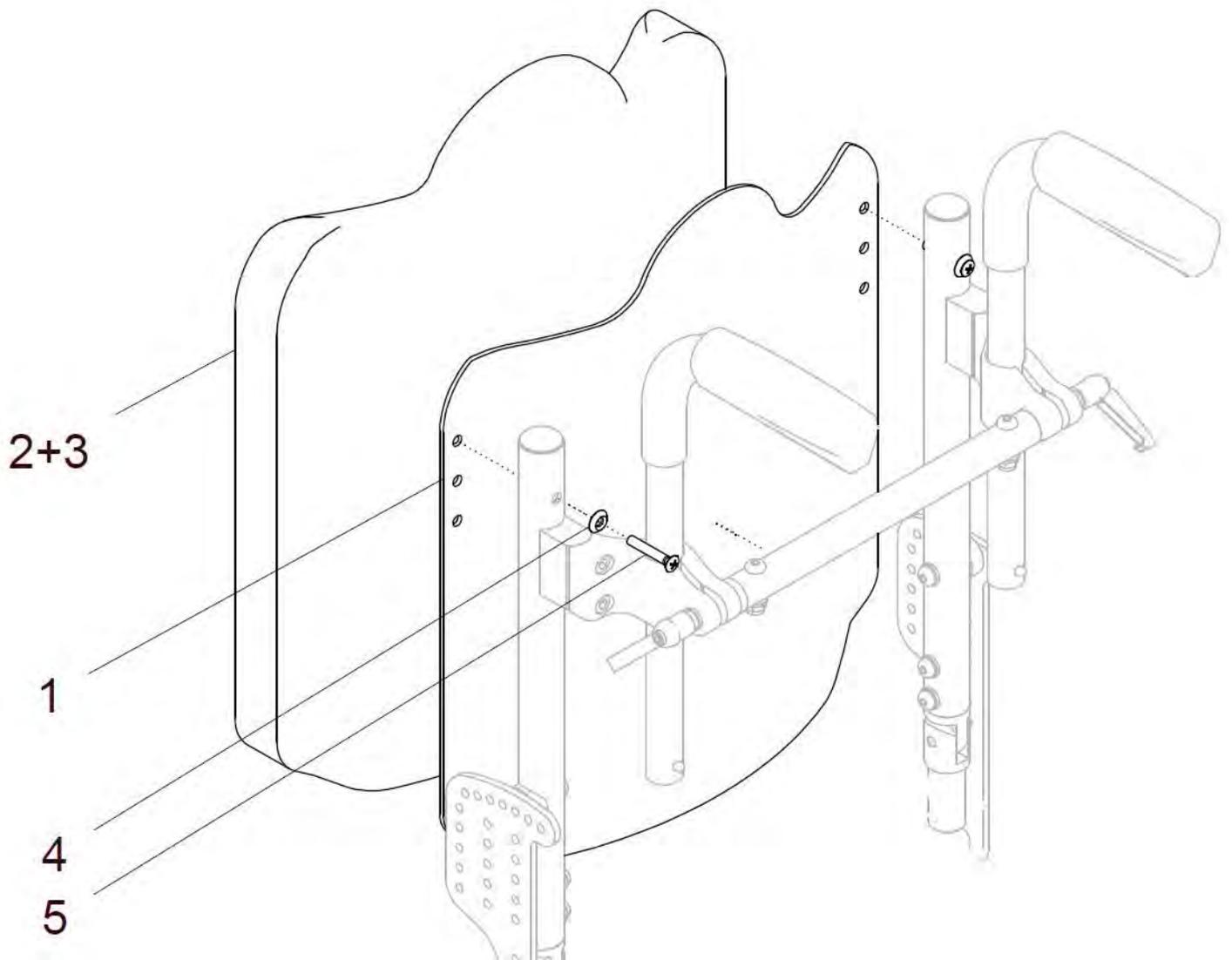

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	25 236 00	<b>Rücken FIDIBUS - ASR (2-teiliger Rücken)</b> <b>Rückenblech FIDIBUS-ASR (Alu-Rückenblech)</b> <b>mit anatomisch geformter Rückenpolster ASR</b> <b>und atmungsaktivem Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...) FM: ?	kpl.  1 St.
1	25 236 91	Rückenblech FIDIBUS-ASR Rückenblech pulverbeschichtet (ohne Polster) SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FM: ?	1 St.
1.1	25 236 90	Rückenblech FIDIBUS-ASR - roh - (nicht pulverbeschichtet) SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2 – 3	25 236 50	<b>Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR mit Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
2	25 236 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
3	25 236 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
4	01 350 02	Rosette ø5,3 - DIN 17670	2 St.
5a	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - ISO 7047 A2	2 St.
5b	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - ISO 7047 A2 (Nur bei Verwendung von fest angeschraubten Seitenpelotten)	2 St.

**Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - CARBON (ASR)**

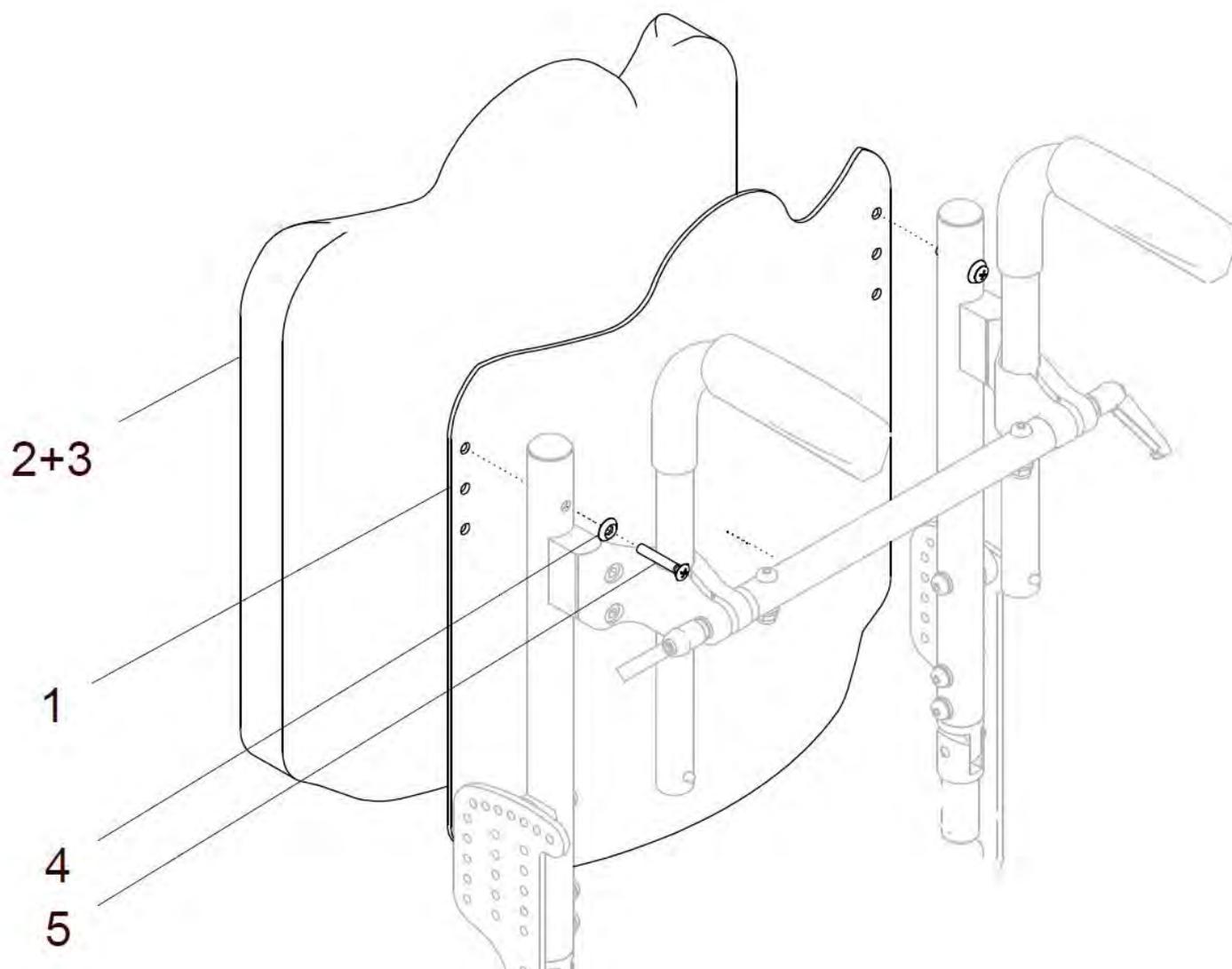


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	25 237 00	<b>Rücken FIDIBUS-CARBON angeschraubt kpl.</b> <b>Rückenschale FIDIBUS-Carbon mit anatomisch geformter Rückenpolster ASR und atmungsaktivem Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1	25 237 91	Rückenschale CARBON FIDIBUS-Carbon (ASR) SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
2 – 3	25 236 50	<b>Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR mit Bezug</b> SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
2	25 236 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40)	1 St.
3	25 236 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR SB: ? (SB 24 – 40) RH: ? (RH 20 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
4	01 350 02	Rosette ø5,3 - DIN 17670	2 St.
5a	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - ISO 7047 A2	2 St.
5b	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - ISO 7047 A2 (Nur bei Verwendung von fest angeschraubten Seitenpelotten)	2 St.




# Sitz

## Gruppe 3

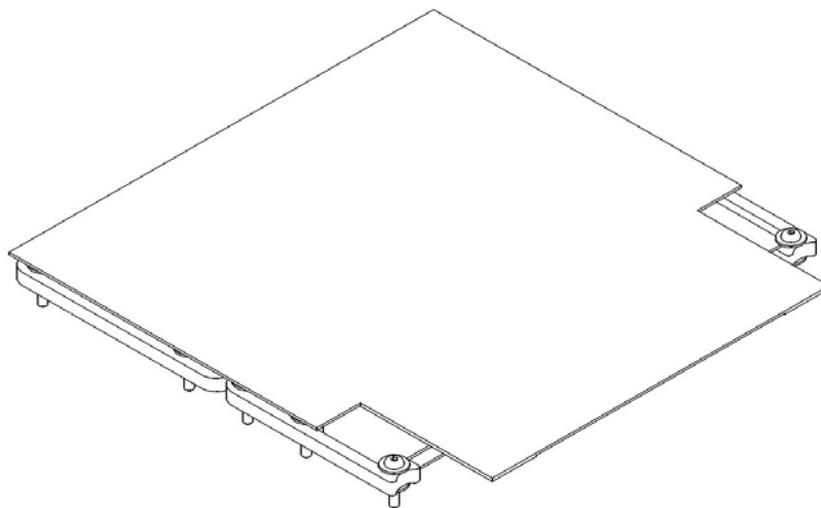


## PC-Carbon – Sitzplatte

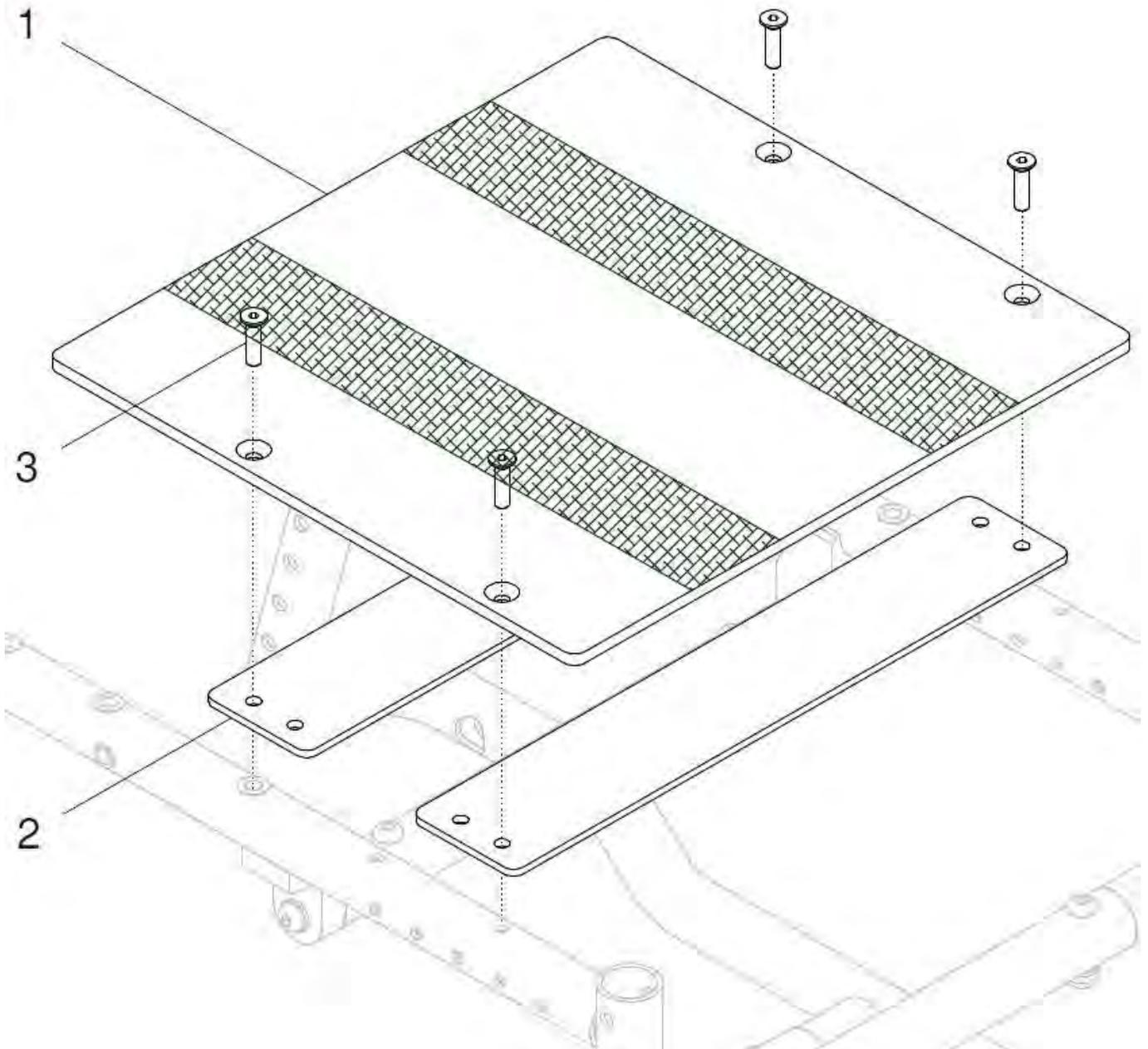

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	28 311 00	<b>Sitzplatte PC-Carbon verschraubt kpl. mit Verstärkungsblechen ab SB 28</b> SB: ? ST: ? Rahmenlänge: ?	1 St.
1a	28 311 10	Sitzplatte - PC Carbon SB ... / Rahmenlänge 1 (ST 22-26) SB: ? ST: ?	1 St.
1b	28 311 20	Sitzplatte - PC Carbon SB ... / Rahmenlänge 2 (ST 26-30) SB: ? ST: ?	1 St.
1c	28 311 30	Sitzplatte - PC Carbon SB ... / Rahmenlänge 3 (ST 30-34) SB: ? ST: ?	1 St.
1d	28 311 40	Sitzplatte - PC Carbon SB ... / Rahmenlänge 4 (ST 34-38) SB: ? ST: ?	1 St.
2	28 311 21	Verstärkungsblech Sitz (ab SB 28cm) SB: ?	2 St.
3	01 120 05	Senkkopfschraube M5x25 DIN 7991 – A2	4 / 6 St.

## Sitzkissen

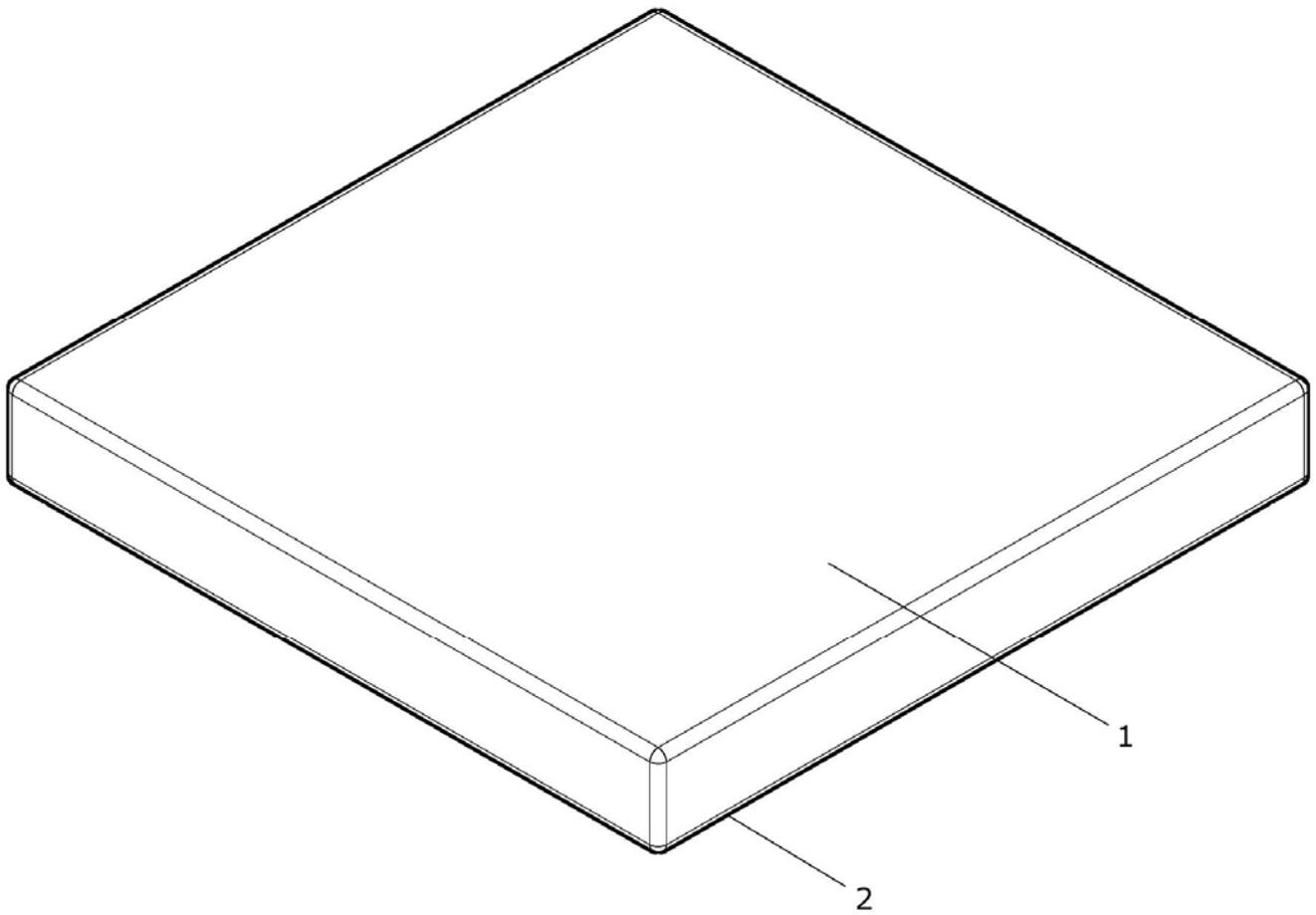


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2a	50 393 00	<b>Sitzkissen schwarz 3cm kpl.</b> SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 393 01	Sitzkissen-Verbundschaum 3cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2a	50 393 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2b	45 393 00	<b>Sitzkissen 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl.</b> SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2b	45 393 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2c	45 393 50	<b>Sitzkissen SLIMLINE 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl.</b> SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2c	45 393 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 393 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2d	50 395 00	<b>Sitzkissen schwarz 5cm kpl.</b> SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 395 01	Sitzkissen-Verbundschaum 5cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2d	50 395 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2e	45 395 00	<b>Sitzkissen 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl.</b> SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2e	45 395 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2f	45 395 50	<b>Sitzkissen SLIMLINE 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl.</b> SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2f	45 395 90	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 395 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.



## FIDIBUS – anatomisch geformte Sitzeinheit

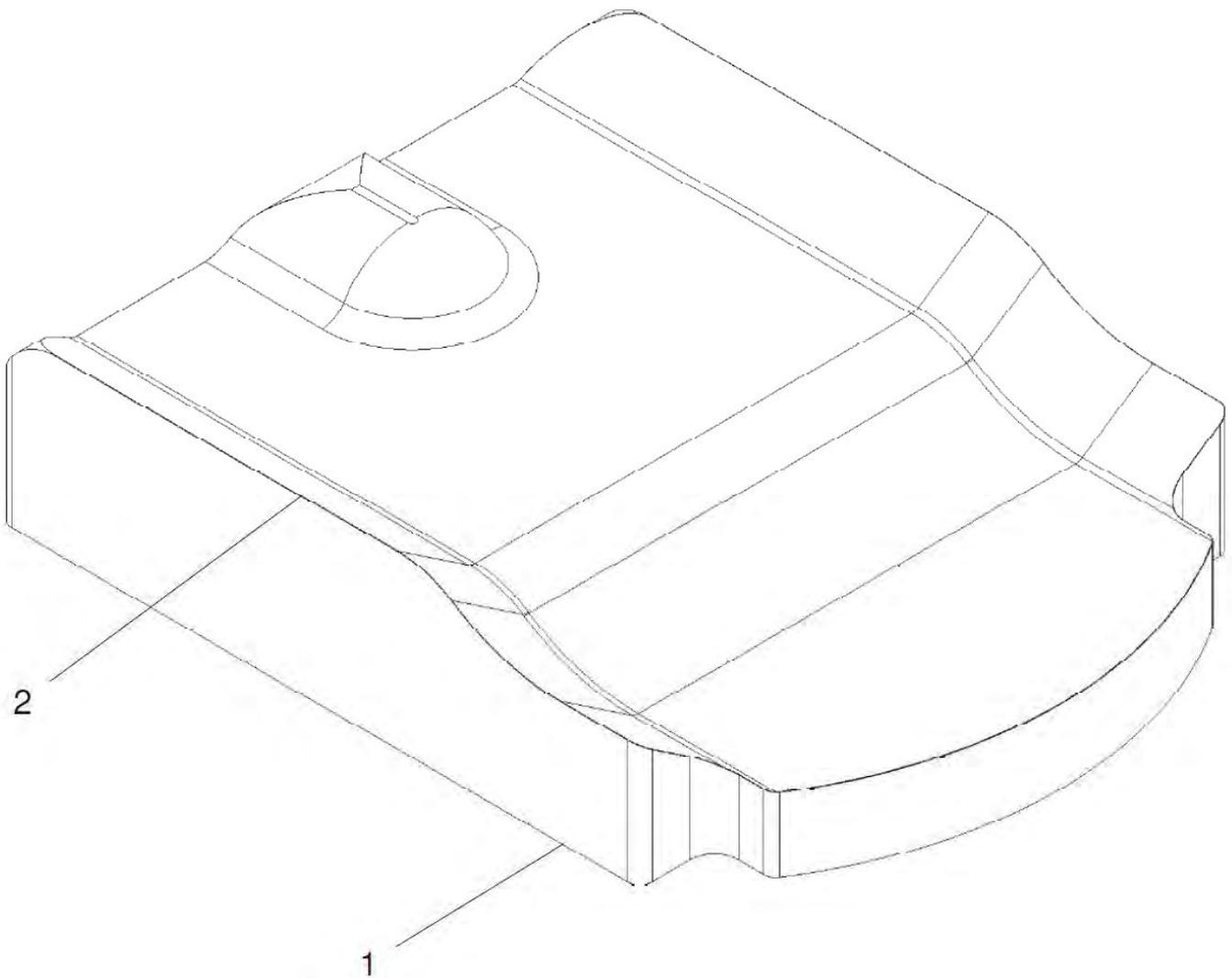

**FIDIBUS-Sitzkissen bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	25 350 00	<b>FIDIBUS Sitz - anatomisch geformter Sitz SB.. ST.. kpl.</b> Sitzformteil mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte (bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken) SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff .....	1 St.
1	25 351 00	Sitzkissen FIDIBUS (ohne Bezug) Anatomisch geformtes Sitzkissen FIDIBUS mit eingearbeiteter Aluplatte (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 251 81	Bezug für anatomisch geformten Sitz FIDIBUS SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff .....	1 St.


**FIDIBUS-F-Sitzkissen bei Verwendung einer Rückenbespannung:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	25 355 00	<b>Sitzkissen FIDIBUS-F - anatomisch geformt SB.. ST.. kpl.</b> anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F (hinten gerade) für Rollstühle mit Rückenbespannung, mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff .....	1 St.
1	25 356 00	Sitzkissen FIDIBUS-F (ohne Bezug) anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F für Rollstühle mit Rückenbespannung (hinten gerade) mit eingearbeiteter Aluplatte (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 356 81	Bezug für anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff .....	1 St.




# Seitenteil

## Gruppe 4

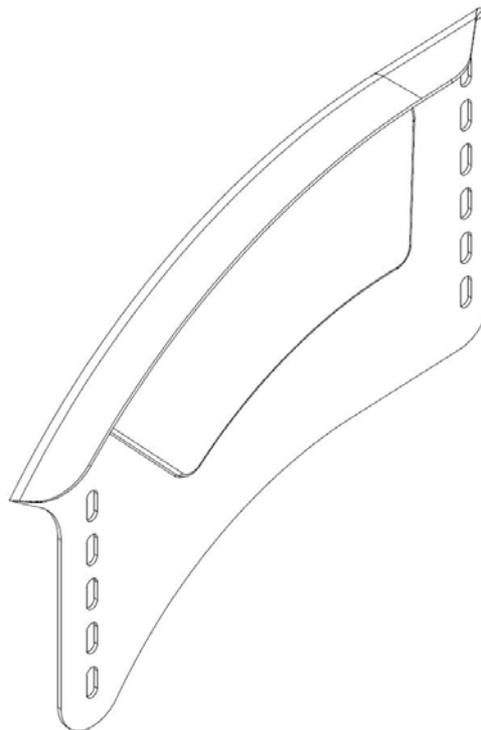

## Kleiderschutz rund Aluminium

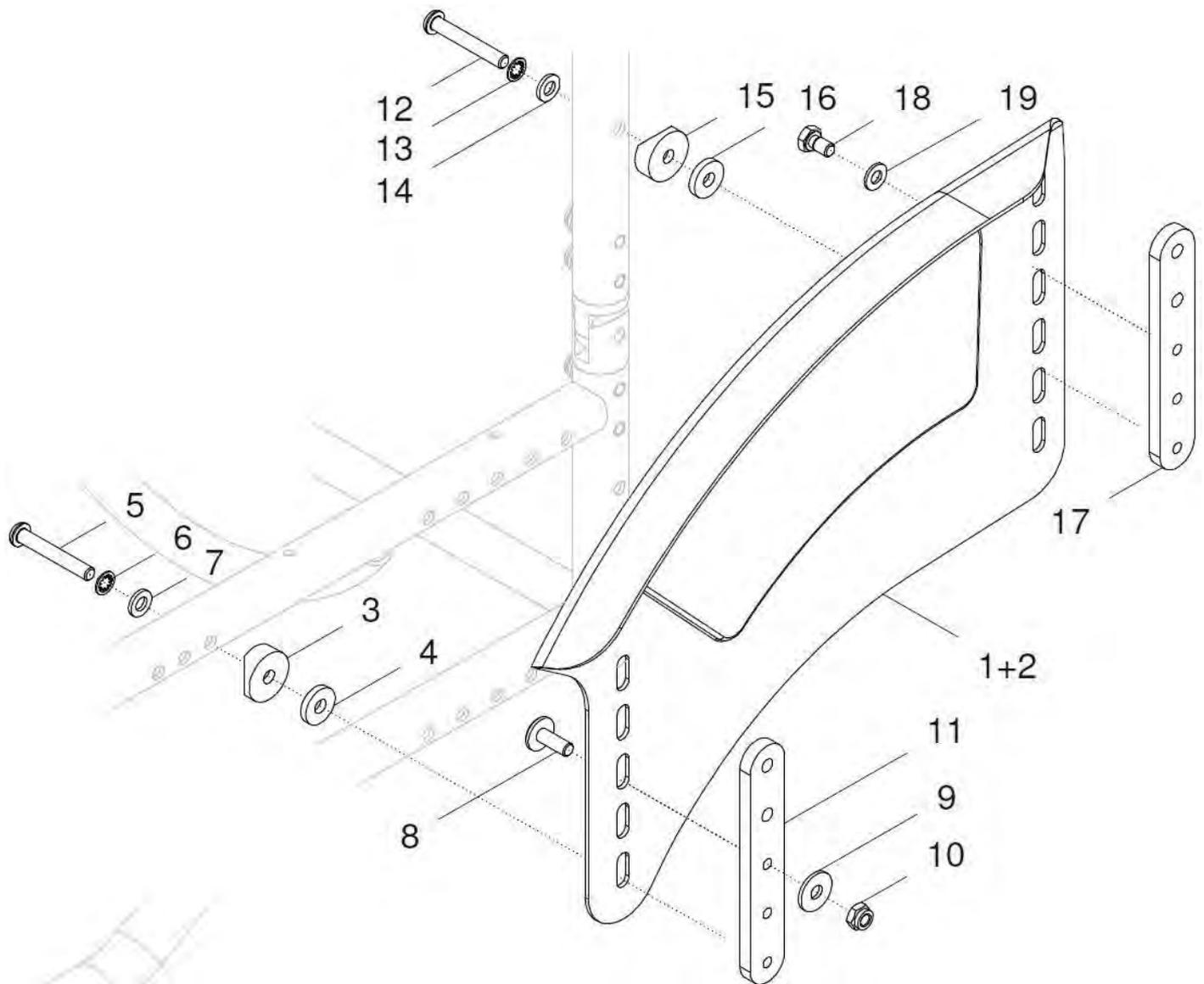

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 410 00	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 Paar
1a – 19	28 410 20	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1b – 19	28 410 30	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1a	50 416 01	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	50 417 01	Kleiderschutz 24“ rund Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
<b>3 – 11</b>	<b>28 411 10</b>	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	<b>2 Set</b>
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 410 50	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 Paar
1c – 19	28 410 60	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1d – 19	28 410 70	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1c	22 426 01	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1d	22 427 01	Kleiderschutz 22“ rund Aluminium links FM: ?	1 St.

Für Rahmenlänge 1: (bei Abduktionsrahmen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 410 55	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 Paar
1e – 19	28 410 65	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 St.
1f – 19	28 410 75	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 St.
1e	25 412 01	Kleiderschutz 22“ rund kurz Aluminium rechts (nur für Abduktionsrahmen Rahmenlänge 1) FM: ?	1 St.
1f	25 413 01	Kleiderschutz 22“ rund kurz Aluminium links (nur für Abduktionsrahmen Rahmenlänge 1) FM: ?	1 St.



**Kleiderschutz rund Aluminium mit Armpolster angeschraubt**

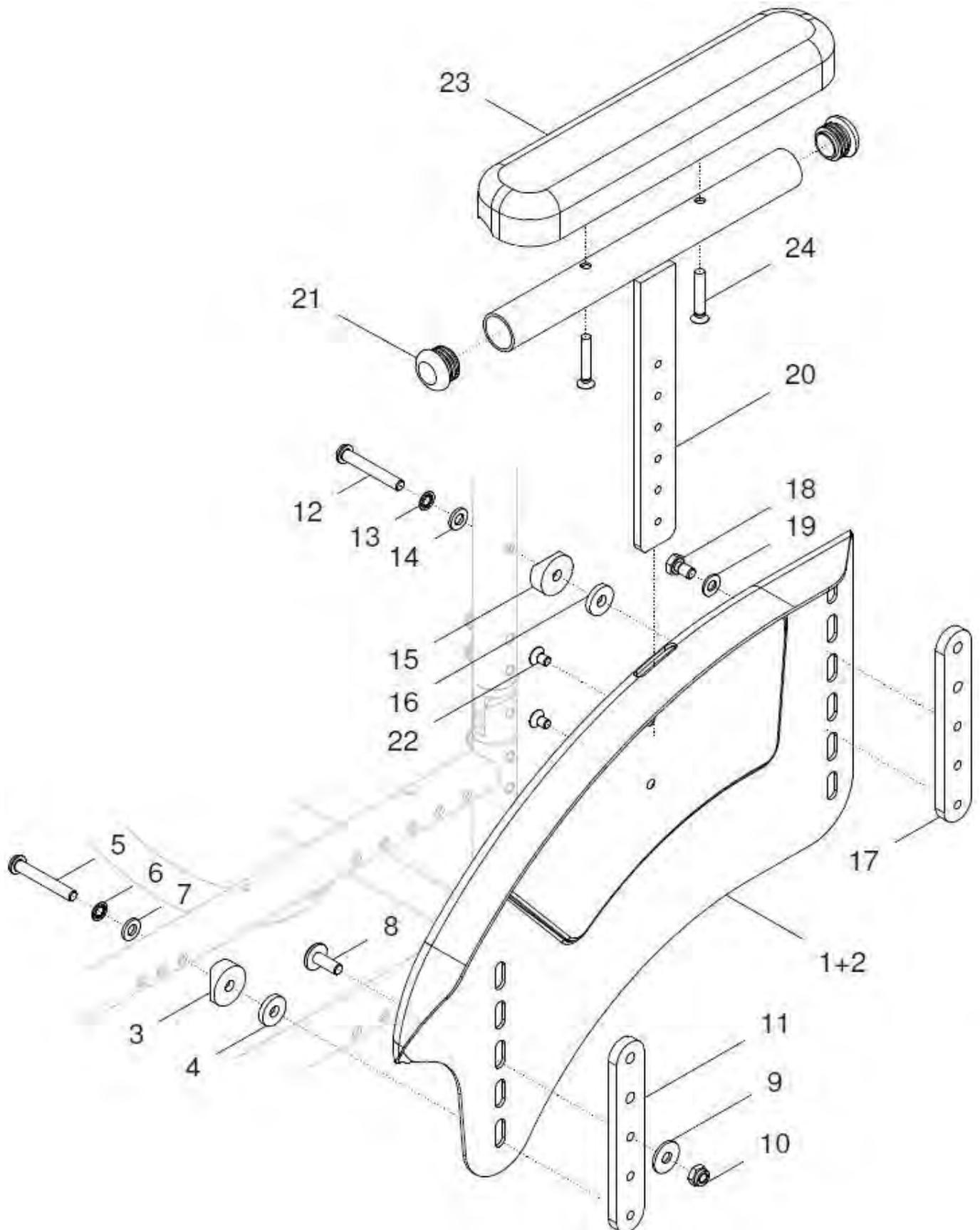

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 24	28 420 00	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 Paar
1a – 24	28 420 20	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1b – 24	28 420 30	<b>Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1a	50 416 51	Kleiderschutz 24“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	50 417 51	Kleiderschutz 24“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
12 – 19	28 411 20	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	2 Set
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.


<b>20 - 24</b>	<b>50 415 50</b>	<b>Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl.</b> links und rechts verwendbar	<b>2 St.</b>
20	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
21	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
22	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
23	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
24	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 24	28 420 50	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 Paar
1c – 24	28 420 60	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1d – 24	28 420 70	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4 FM: ?	1 St.
1c	22 426 51	Kleiderschutz 22“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1d	22 427 51	Kleiderschutz 22“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.

Für Rahmenlänge 1: (bei Abduktionsrahmen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 24	28 420 55	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. <u>kurz</u> mit Armpolster kurz FILOU kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 Paar
1e – 24	28 420 65	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. <u>kurz</u> mit Armp. kurz FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 St.
1f – 24	28 420 75	<b>Kleiderschutz 22“ Alu. <u>kurz</u> mit Armp. kurz FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1 FM: ?	1 St.
1e	25 412 51	Kleiderschutz 22“ kurz rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1f	25 413 51	Kleiderschutz 22“ kurz links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.

## Kleiderschutz rund PC-Carbon

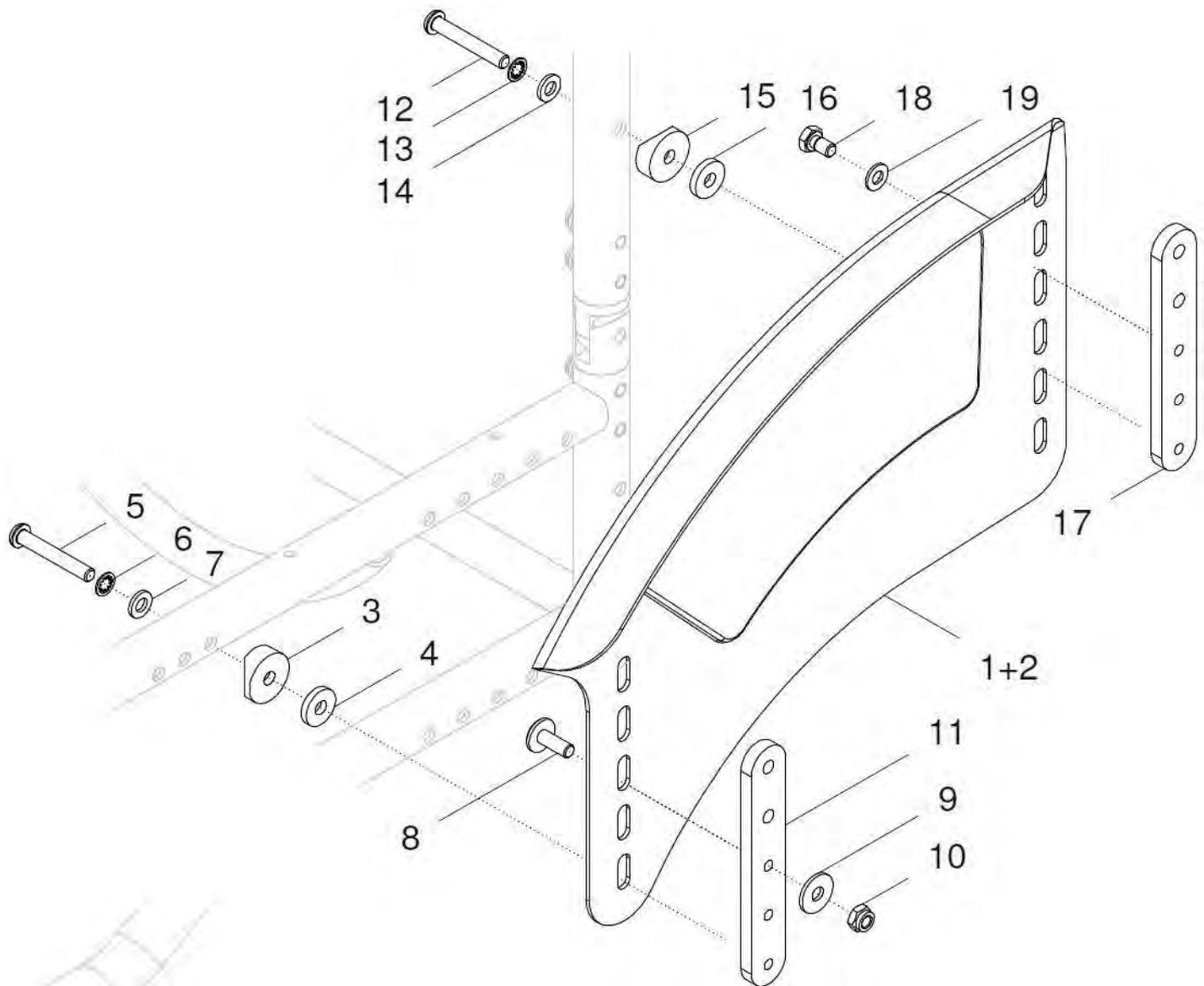

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 430 00	<b>Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 Paar
1a – 19	28 430 20	<b>Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 St.
1b – 19	28 430 30	<b>Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 24“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 St.
1a	22 452 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1b	22 453 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
12 – 19	28 411 20	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	2 Set
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 430 50	<b>Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 Paar
1c – 19	28 430 60	<b>Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 St.
1d – 19	28 430 70	<b>Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ mit Kälteschutz</b> Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 - 4 Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 - 4	1 St.
1c	22 452 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1d	22 453 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links	1 St.

Für Rahmenlänge 1: (bei Abduktionsrahmen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 19	28 430 55	<b>Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-CARBON FILOU (Paar) kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1	1 Paar
1e – 19	28 430 65	<b>Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-CARBON FILOU rechts kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1	1 St.
1f – 19	28 430 75	<b>Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-CARBON FILOU links kpl.</b> <b>Kleiderschutz 22“ kurz mit Kälteschutz</b> Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1	1 St.
1e	22 452 41	Kleiderschutz 22“ rund kurz PC-CARBON rechts (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.
1f	22 453 41	Kleiderschutz 22“ rund kurz PC-CARBON links (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.



**Kleiderschutz rund Aluminium mit Bremse im Seitenteil**

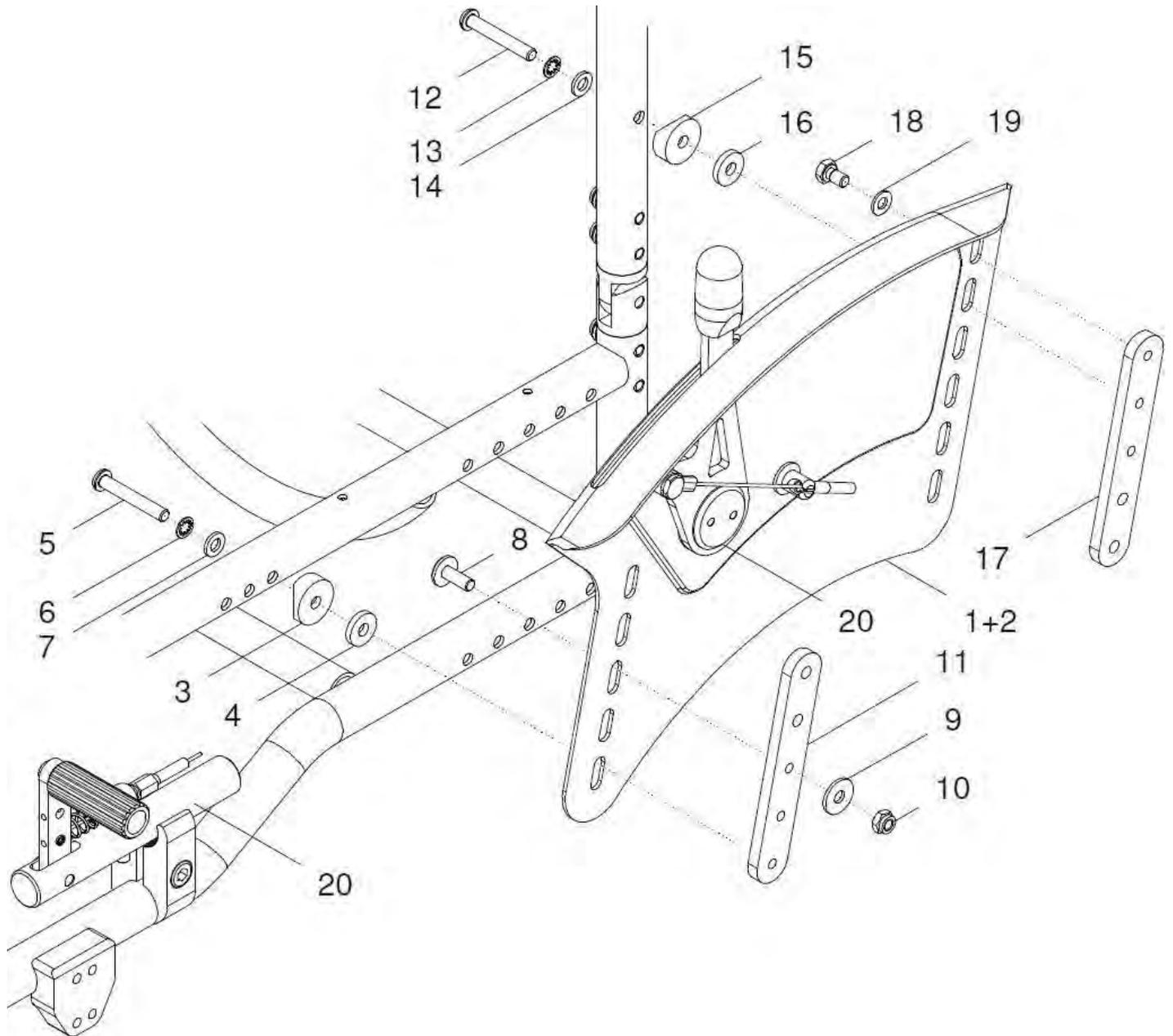

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 418 00	<p><b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund mit Bremse integriert FILOU kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 418 02	<p><b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund rechts mit Bremse integriert kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund rechts mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1b, 2b – 20b	28 418 03	<p><b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund links mit Bremse integriert kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund links mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1a, 2a – 19	28 418 20	<p><b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund rechts (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1b, 2b - 19	28 418 30	<p><b>Kleiderschutz 24“ Alu. rund links (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1a	50 418 21	<p>Kleiderschutz 24“ rund Alu. rechts mit Schlitz für integrierte Bremse                      FM: ?</p>	1 St.
1b	50 418 31	<p>Kleiderschutz 24“ rund Alu. links mit Schlitz für integrierte Bremse                      FM: ?</p>	1 St.
2a	50 418 22	<p>Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse</p>	1 St.
2b	50 418 32	<p>Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse</p>	1 St.
3 – 11	28 411 10	<p><b>Verbindungssteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b></p>	2 Set

**FILOU**

3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>

**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 418 50	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund mit Bremse integriert FILOU kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 418 52	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund rechts mit Bremse integriert kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund rechts mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1b, 2b – 20b	28 418 53	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund links mit Bremse integriert kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund links mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1a, 2a – 19	28 418 60	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund rechts (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1b, 2b - 19	28 418 70	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund links (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1a	22 428 21	<p>Kleiderschutz 22“ rund Alu. rechts mit Schlitz für integrierte Bremse                      FM: ?</p>	1 St.
1b	22 428 31	<p>Kleiderschutz 22“ rund Alu. links mit Schlitz für integrierte Bremse                      FM: ?</p>	1 St.
2a	50 418 22	<p>Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse</p>	1 St.
2b	50 418 32	<p>Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse</p>	1 St.
3 – 11	28 411 10	<p><b>Verbindungssteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b></p>	2 Set

**FILOU**

3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>

**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**

Für Rahmenlänge 1: (bei Abduktionsrahmen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 418 80	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> mit Bremse integr. FILOU kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund kurz mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 418 82	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> rechts mit Bremse integr. kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund kurz rechts mit Kälteschutz u. Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1b, 2b – 20b	28 418 83	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> links mit Bremse integr. kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund kurz links mit Kälteschutz u. Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)                      FM: ?                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1a, 2a – 19	28 418 90	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> rechts (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1b, 2b - 19	28 418 95	<p><b>Kleiderschutz 22“ Alu. rund <u>kurz</u> links (für integr. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)                      FM: ?</p>	1 St.
1a	25 414 21	<p>Kleiderschutz 22“ rund Alu. <u>kurz</u> rechts mit Schlitz für integr. Bremse                      FM: ? (nur für Rahmenlänge 1)</p>	1 St.
1b	25 414 31	<p>Kleiderschutz 22“ rund Alu. <u>kurz</u> links mit Schlitz für integr. Bremse                      FM: ? (nur für Rahmenlänge 1)</p>	1 St.
2a	50 418 22	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
2b	50 418 32	Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set


**FILOU**

3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>

**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**



**Kleiderschutz rund PC-Carbon mit Bremse im Seitenteil**

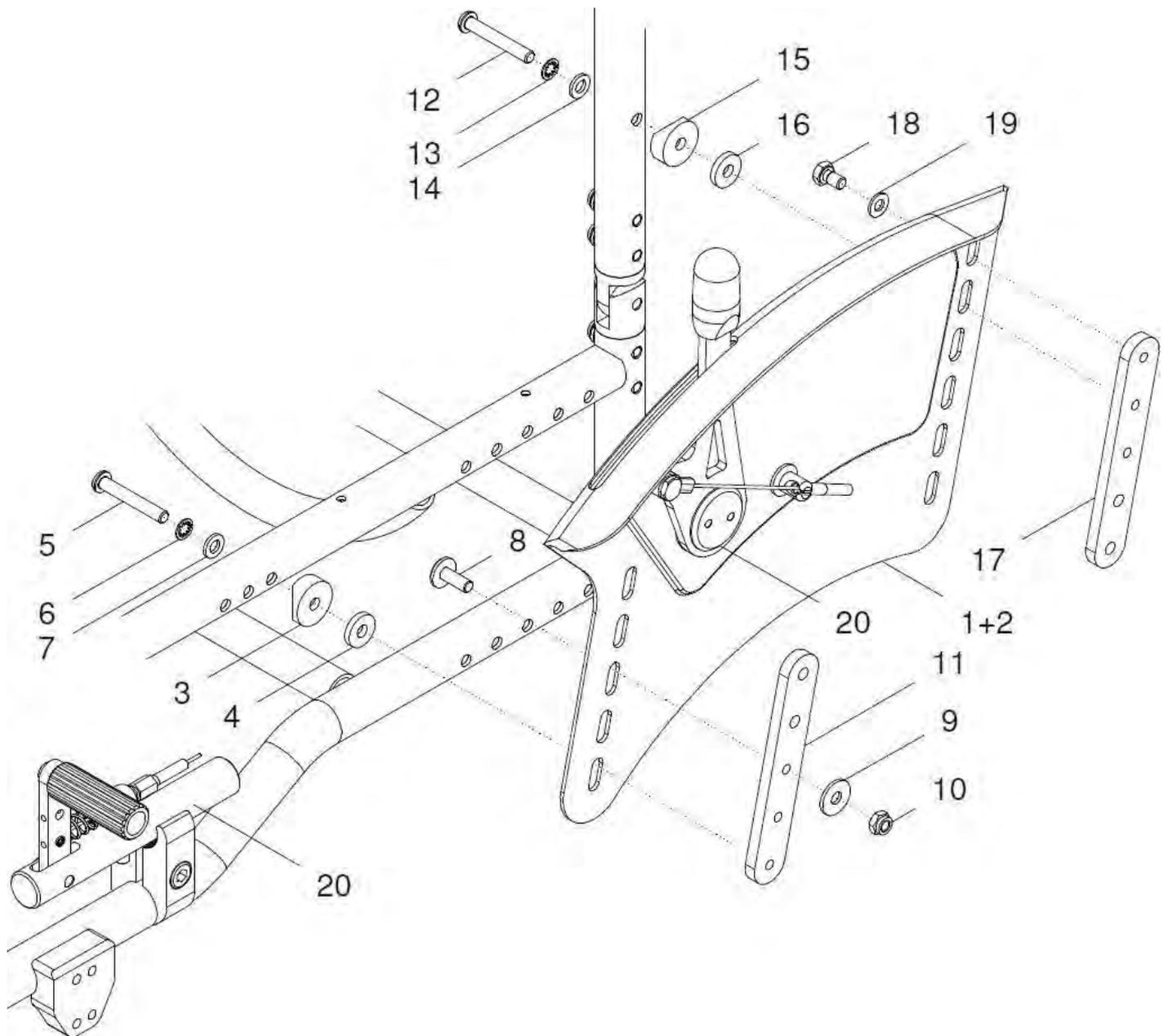

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 419 00	<p><b>Kleiderschutz 24“ PC-CARBON rund mit Bremse integr. kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund PC-Carbon mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 419 02	<p><b>Kleiderschutz 24“ PC-CARBON rund rechts m. Bremse integ. kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund PC-Carbon rechts mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1b, 2b – 20b	28 419 03	<p><b>Kleiderschutz 24“ PC-CARBON rund links m. Bremse integ. kpl.</b>                      Kleiderschutz 24“ rund PC-Carbon links mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1a, 2a – 19	28 419 20	<p><b>Kleiderschutz 24“ PC-CARBON rund rechts (f. int. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)</p>	1 St.
1b, 2b - 19	28 419 30	<p><b>Kleiderschutz 24“ PC-CARBON rund links (f. int. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)</p>	1 St.
1a	22 458 21	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts mit Schlitz für integrierte Bremse	1 St.
1b	22 458 31	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links mit Schlitz für integrierte Bremse	1 St.
2a	50 418 22	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
2b	50 418 32	Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.

**FILOU**

5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>

**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 419 50	<p><b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund mit Bremse integr. kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund PC-Carbon mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 1 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 419 52	<p><b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund rechts m. Bremse integ. kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund PC-Carbon rechts mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1b, 2b – 20b	28 419 53	<p><b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund links m. Bremse integ. kpl.</b>                      Kleiderschutz 22“ rund PC-Carbon links mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen                      (Rahmen gerade für Rahmenlänge 2 – 4)                      (Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 2 – 4)                      Gabelbolzen: ? (<u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°)                      Bremshebelkappe: ? (<u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel)                      Bremshebel: ? (<u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt)                      (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)</p>	1 St.
1a, 2a – 19	28 419 60	<p><b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund rechts (f. int. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)</p>	1 St.
1b, 2b - 19	28 419 70	<p><b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund links (f. int. Bremse) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b>                      (ohne integrierte Bremse)</p>	1 St.
1a	22 458 61	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts mit Schlitz für integrierte Bremse	1 St.
1b	22 458 71	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links mit Schlitz für integrierte Bremse	1 St.
2a	50 418 22	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
2b	50 418 32	Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.

**FILOU**

5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>

**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**

Für Rahmenlänge 1: (bei Abduktionsrahmen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	28 419 80	<b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund <u>kurz</u> + Bremse integr. kpl.</b> Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-Carbon mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen <b>(Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)</b> Gabelbolzen: ? ( <u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°) Bremshebelkappe: ? ( <u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel) Bremshebel: ? ( <u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt) (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)	1 Paar
1a, 2a – 20a	28 419 82	<b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund <u>kurz</u> rechts +Bremse int. kpl.</b> Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-Carbon rechts mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen <b>(Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)</b> Gabelbolzen: ? ( <u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°) Bremshebelkappe: ? ( <u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel) Bremshebel: ? ( <u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt) (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)	1 St.
1b, 2b – 20b	28 419 83	<b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund <u>kurz</u> links +Bremse int. kpl.</b> Kleiderschutz 22“ rund <u>kurz</u> PC-Carbon links mit Kälteschutz und Montagezubehör für FILOU und mit Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebel, Bowdenzug und Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter und mit Verstärkungsschienen <b>(Abduktionsrahmen für Rahmenlänge 1)</b> Gabelbolzen: ? ( <u>gerade lang</u> / gerade kurz / abgekröpft 20°) Bremshebelkappe: ? ( <u>Kappe</u> / Halbkugel verschraubt / Kugel) Bremshebel: ? ( <u>lang</u> / kurz mit Bohrung / abgewinkelt) (Standard ist fett und unterstrichen dargestellt)	1 St.
1a, 2a – 19	28 419 90	<b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund <u>kurz</u> rechts (f. int. Br.) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b> (ohne integrierte Bremse) (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.
1b, 2b - 19	28 419 95	<b>Kleiderschutz 22“ PC-CARBON rund <u>kurz</u> links (f. int. Br.) kpl. mit Montagezubehör für FILOU</b> (ohne integrierte Bremse) (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.
1a	22 458 66	Kleiderschutz 22“ <u>kurz</u> rund PC-CARBON rechts mit Schlitz für integrierte Bremse (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.
1b	22 458 76	Kleiderschutz 22“ <u>kurz</u> rund PC-CARBON links mit Schlitz für integrierte Bremse (nur für Rahmenlänge 1)	1 St.
2a	50 418 22	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
2b	50 418 32	Kälteschutz links für Kleiderschutz rund für integrierte Bremse	1 St.
3 – 11	28 411 10	<b>Verbindungsteile für Kleiderschutz vorne FILOU</b>	2 Set
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.

**FILOU**

4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
5	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
8	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 zns	2 St.
9	01 321 02	Scheibe 6,4 DIN 9021 groß	2 St.
10	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
11	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
<b>12 – 19</b>	<b>28 411 20</b>	<b>Verbindungssteile für Kleiderschutz hinten FILOU</b>	<b>2 Set</b>
12	01 152 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 A2	2 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
15	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
16	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 DIN 7349 groß	2 St.
17	28 411 01	Verstärkung für Kleiderschutz FILOU	2 St.
18	01 113 01	Sechskantschraube M6x10 - DIN 933 vz	2 St.
19	01 328 02D	Passscheibe 6x12x0,5 - DIN 988 A2	2 St.
<b>20a</b>	<b>25 742 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>
<b>20b</b>	<b>25 743 00</b>	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Gabelbolzen: ? (gerade lang / gerade kurz / abgekröpft 20°)	<b>1 St.</b>


**Einzelteile für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 7**






# Fußbrett

## Gruppe 5

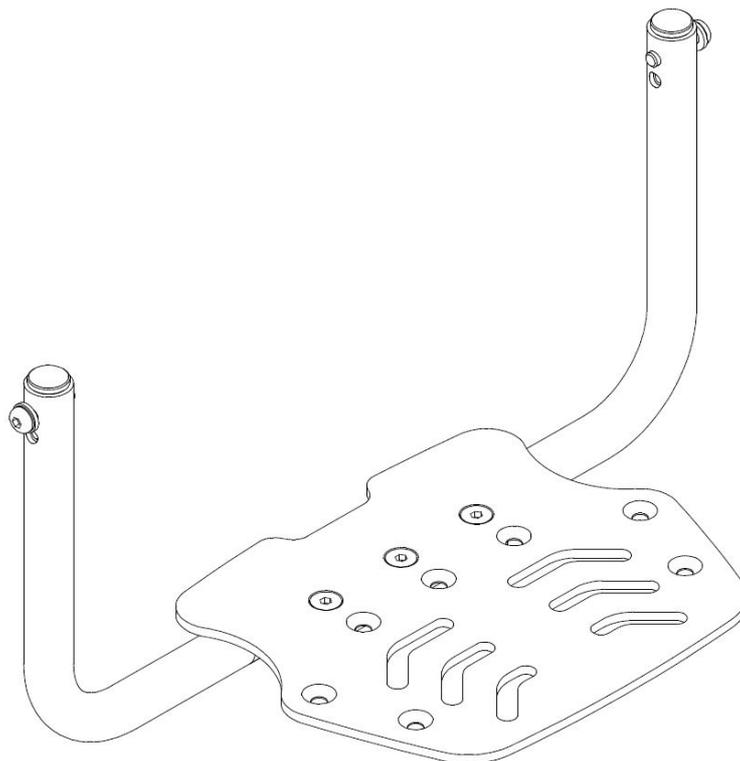

**Fußbrett Platte durchgehend (mit FB-Bügel)**

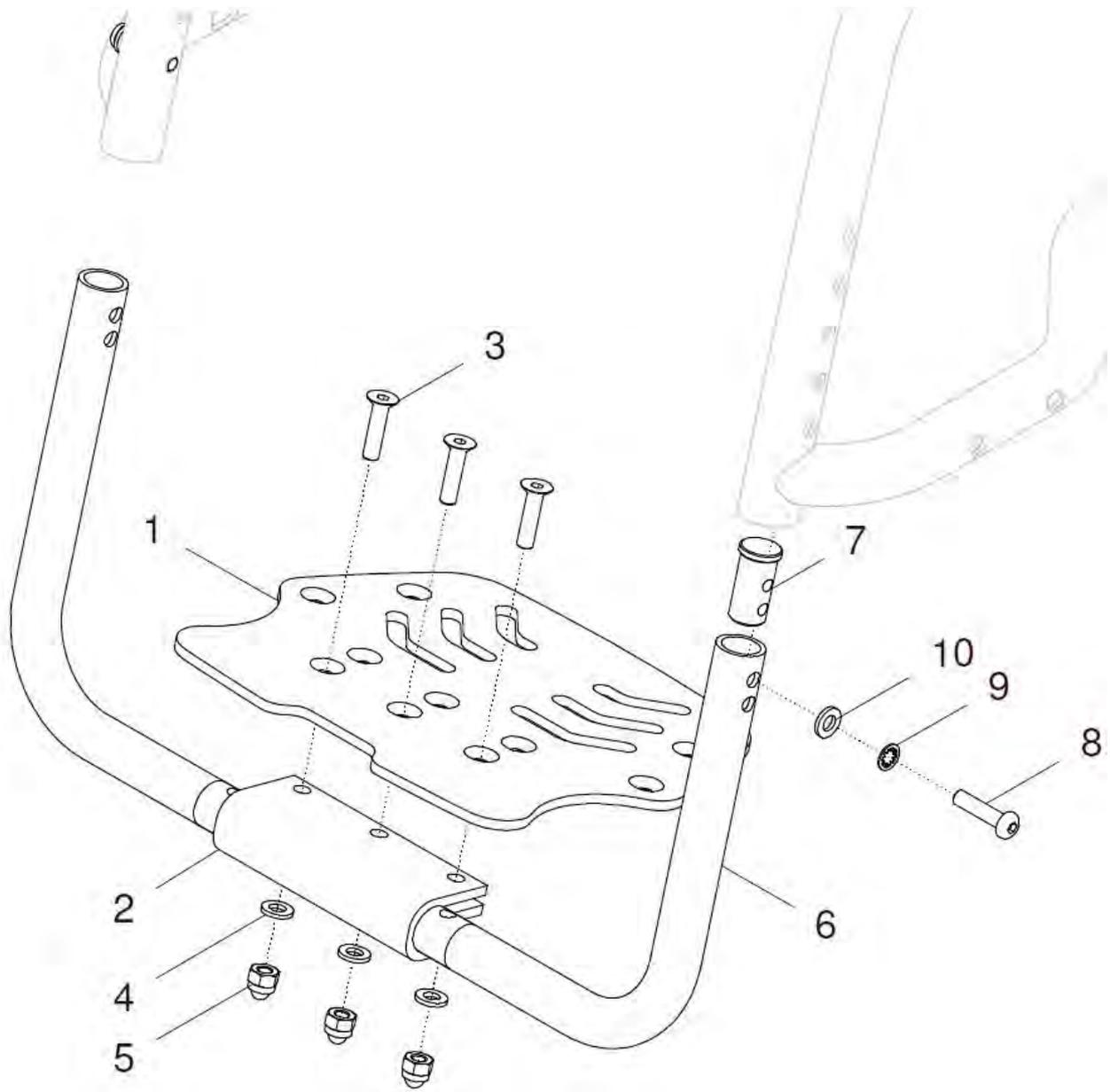


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	25 510 00	<b>Fußbrett Platte durchgehend / für Rahmen gerade kpl.</b> <b>Fußbrettplatte mit Fußbrettbügel</b> <b>nicht hochklappbar</b> SB: ? FM: ? USL: ? (FB-Bügel lang oder kurz)	1 St.
1a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 SB 24 – 26 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 SB 28 – 30 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 SB 32 – 34 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 SB 36 – 38 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 SB 40 – 42 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1f	85 515 15	Fußbrett-Platte 360 SB 44 – 46 Rahmen gerade / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
2	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
3	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	3 St.
4	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
5	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	3 St.
6a - 10	25 512 00	<b>Fußbrettbügel kurz kpl. USL: 25 – 30cm</b> SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
6b - 10	25 512 10	<b>Fußbrettbügel lang kpl. USL: 32 – 37cm</b> SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
6a	25 512 01	Fußbrettbügel kurz FINDUS USL: 25 – 30cm SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
6b	25 512 11	Fußbrettbügel lang FINDUS USL: 32 – 37cm SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
7	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
8	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 A2	2 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	25 510 10	<b>Fußbrett Platte durchgehend / für Abduktionsrahmen kpl.</b> <b>Fußbrettplatte mit Fußbrettbügel</b> <b>nicht hochklappbar</b> SB: ? FM: ? USL: ? (FB-Bügel lang oder kurz)	<b>1 St.</b>
1a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 SB 20 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 SB 22 – 24 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 SB 26 – 28 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 SB 30 – 32 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 SB 34 – 38 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
1f	85 515 15	Fußbrett-Platte 360 SB 40 – 44 Abduktionsrahmen / FB-Bügel fest FM: ?	1 St.
2	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
3	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	3 St.
4	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
5	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	3 St.
6a - 10	25 512 00	<b>Fußbrettbügel kurz kpl. USL: 25 – 30cm</b> SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	<b>1 St.</b>
6b - 10	25 512 10	<b>Fußbrettbügel lang kpl. USL: 32 – 37cm</b> SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	<b>1 St.</b>
6a	25 512 01	Fußbrettbügel kurz FINDUS USL: 25 – 30cm SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
6b	25 512 11	Fußbrettbügel lang FINDUS USL: 32 – 37cm SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
7	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
8	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 A2	2 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.



**Fußbrett Platte durchgehend (im Rahmen montiert)**

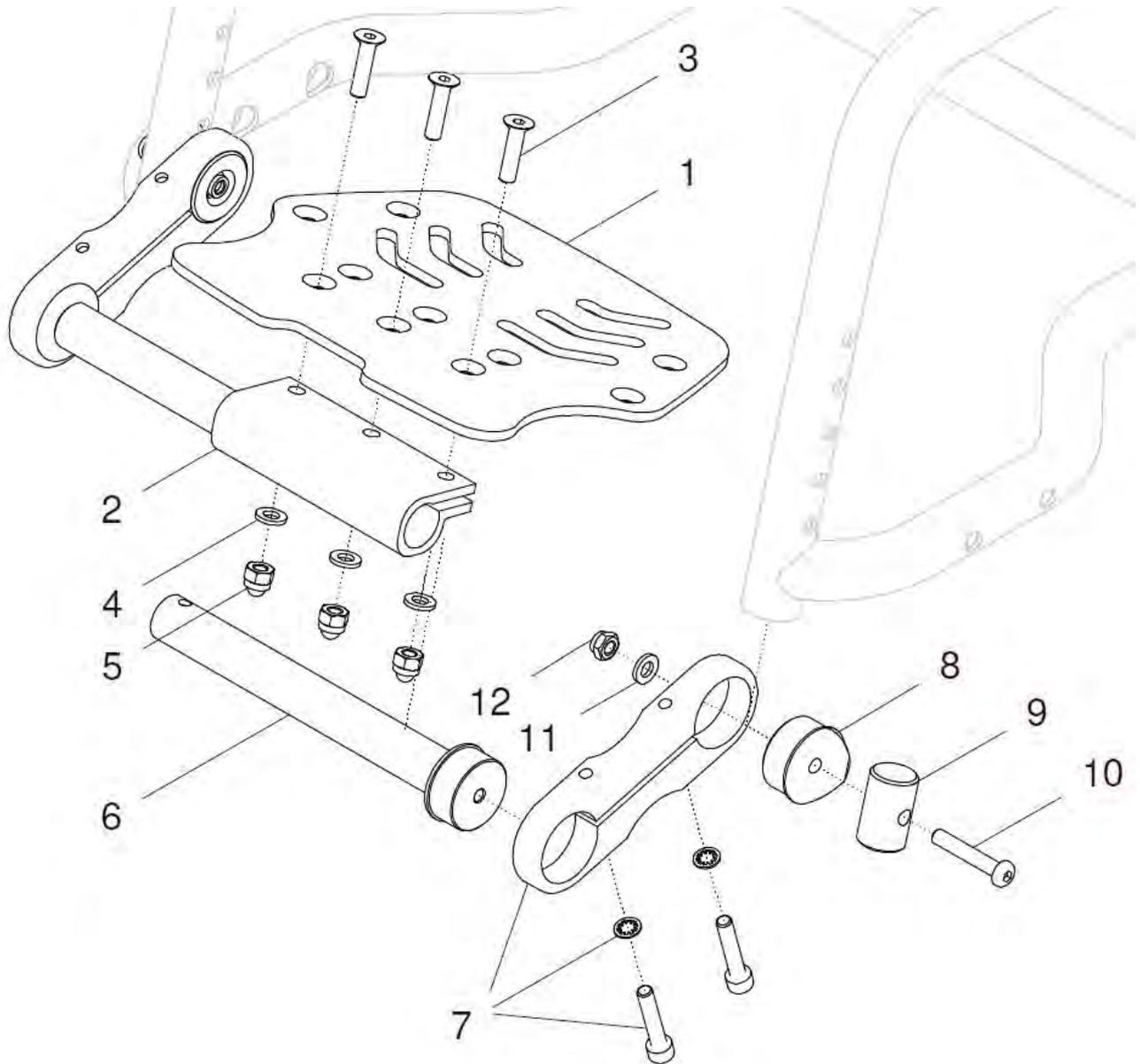


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	25 540 00	<b>Fußbrett Platte durchgd. im Rahmen / Rahmen gerade kpl.</b> <b>Fußbrettplatte durchgehend mit Klemmlaschen im Rahmen montiert (nicht hochklappbar)</b> SB: ? FM: ? USL: ? (Klemmlasche 60 / 85 / 145mm)	1 St.
1a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 SB 24 – 26 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 SB 28 – 30 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 SB 32 – 34 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 SB 36 – 38 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 SB 40 – 42 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1f	85 515 15	Fußbrett-Platte 360 SB 44 – 46 Rahmen gerade / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
2 - 6	25 541 00	<b>Fußbrettbügel-Querrohr mit Auflageblock (ohne Fußbrett-Platte) kpl.</b> SB: ?	1 Set
2	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
3	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	3 St.
4	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
5	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	3 St.
6a	25 541 01	Fußbrettbügel-Querrohr kurz FINDUS SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
6b	25 541 02	Fußbrettbügel-Querrohr lang FINDUS SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	2 St.
7a - 12	22 521 51	<b>Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
7b - 12	22 521 52	<b>Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
7c - 12	22 521 55	<b>Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
7a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
7b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
7c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
8 - 12	22 521 20	<b>Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl.</b> (ohne Klemmlasche)	2 Set
8	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
(8b)	25 521 01	Sonder-Aufnahmebolzen Ø23mm halbseitig (für unterste Bohrung)	2 St.

9	22 521 08	Verstärkungsbolzen für Aufnahme im Rahmen	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
12	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	<b>25 540 10</b>	<b>Fußbrett Platte durchgd. im Rahmen / Abduktion kpl.</b> <b>Fußbrettplatte durchgehend mit Klemmlaschen im Rahmen montiert (nicht hochklappbar)</b> SB: ? FM: ? USL: ? (Klemmlasche 60 / 85 / 145mm)	<b>1 St.</b>
1a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 SB 20 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 SB 22 – 24 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 SB 26 – 28 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 SB 30 – 32 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 SB 34 – 36 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.
1f	85 515 15	Fußbrett-Platte 360 SB 38 Abduktionsrahmen / im Rahmen fest FM: ?	1 St.



**Fußbrett Platte durchgehend mit Fußbrettbügel hochklappbar**

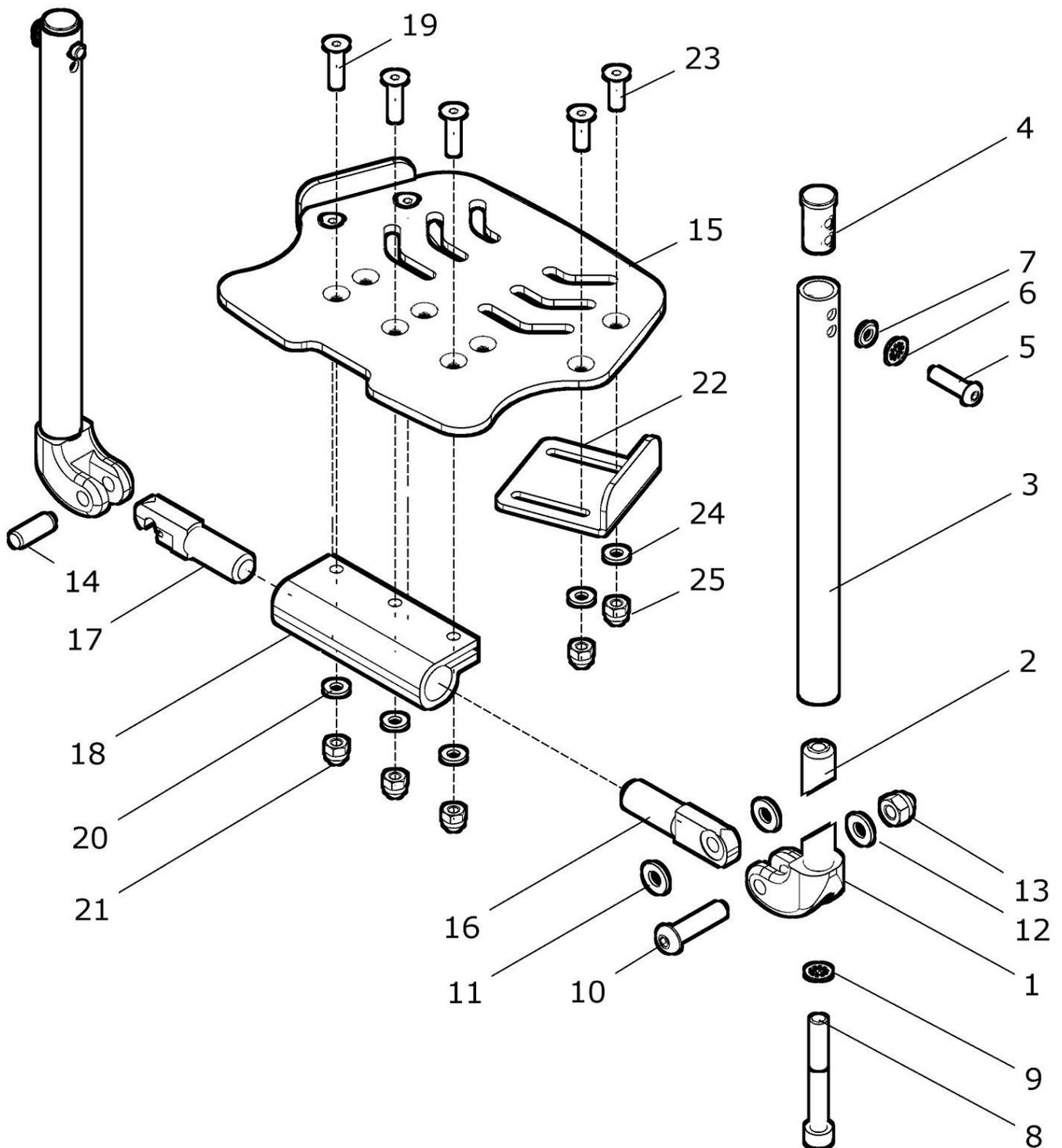

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 510 00	<b>Fußbrett Platte durchgehend winkelverstellbar / Abduktion</b> kpl. <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel hochklappbar, für Rahmen gerade</b> FM: ? SB: ? USL: ? (Fußbrettbügel gerade: ? extra kurz / kurz / lang)	1 St.
1 – 21	22 510 10	<b>Fußbrett Platte durchgehend winkelverstellbar / Abduktion</b> kpl. <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel hochklappbar, für Abduktionsrahmen</b> FM: ? SB: ? USL: ? (Fußbrettbügel gerade: ? extra kurz / kurz / lang)	1 St.
1 – 13	22 512 30	<b>Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme links</b> kpl. <b>mit Linsenkopfschraube (Drehpunkt)</b> FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) / extra kurz (130) ?	1 St.
1 – 9, 14	22 512 20	<b>Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts</b> kpl. <b>und Zylinderstift (Arretierpunkt)</b> FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) / extra kurz (130) ?	1 St.
1	45 511 03	Aufnahme für Fußbrett	2 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) (USL 30 – 36cm)	2 St.
3b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) (USL 24 – 29cm)	2 St.
3c	22 515 01	Fußbrettbügel gerade extra kurz (130mm) (USL 22 – 25cm)	2 St.
4	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 160 83B	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912	2 St.
9	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
15 - 21	40 561 00	<b>Fußbrettplatte durchgehend mit Drehgelenk und Hacken</b> kpl. SB: ? FM: ?	1 St.
15a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ? SB 26 – 28 Rahmen gerade SB 20 – 22 Abduktionsrahmen	1 St.
15b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ? SB 30 – 32 Rahmen gerade SB 24 – 26 Abduktionsrahmen	1 St.


15c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 34 – 38 Rahmen gerade SB 28 – 32 Abduktionsrahmen	1 St.
15d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 40 – 44 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen	1 St.
15e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 40 – 44 Abduktionsrahmen	1 St.
16	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?		1 St.
17	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?		1 St.
18	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend		1 St.
19	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS		3 St.
20	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS		3 St.
21	01 210 73	Hut-Mutter M6 - DIN 986 ZNS		3 St.

**Optional:**

<b>22 - 25</b>	<b>70 520 50</b>	<b>Seitenschutz für Fußbrettplatte</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 Set</b>
22	70 521 03	Seitenschutz		2 St.
23	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991		4 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
25	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986		4 St.



**Fußbrettplatte durchgehend hochklappbar (im Rahmen montiert)**

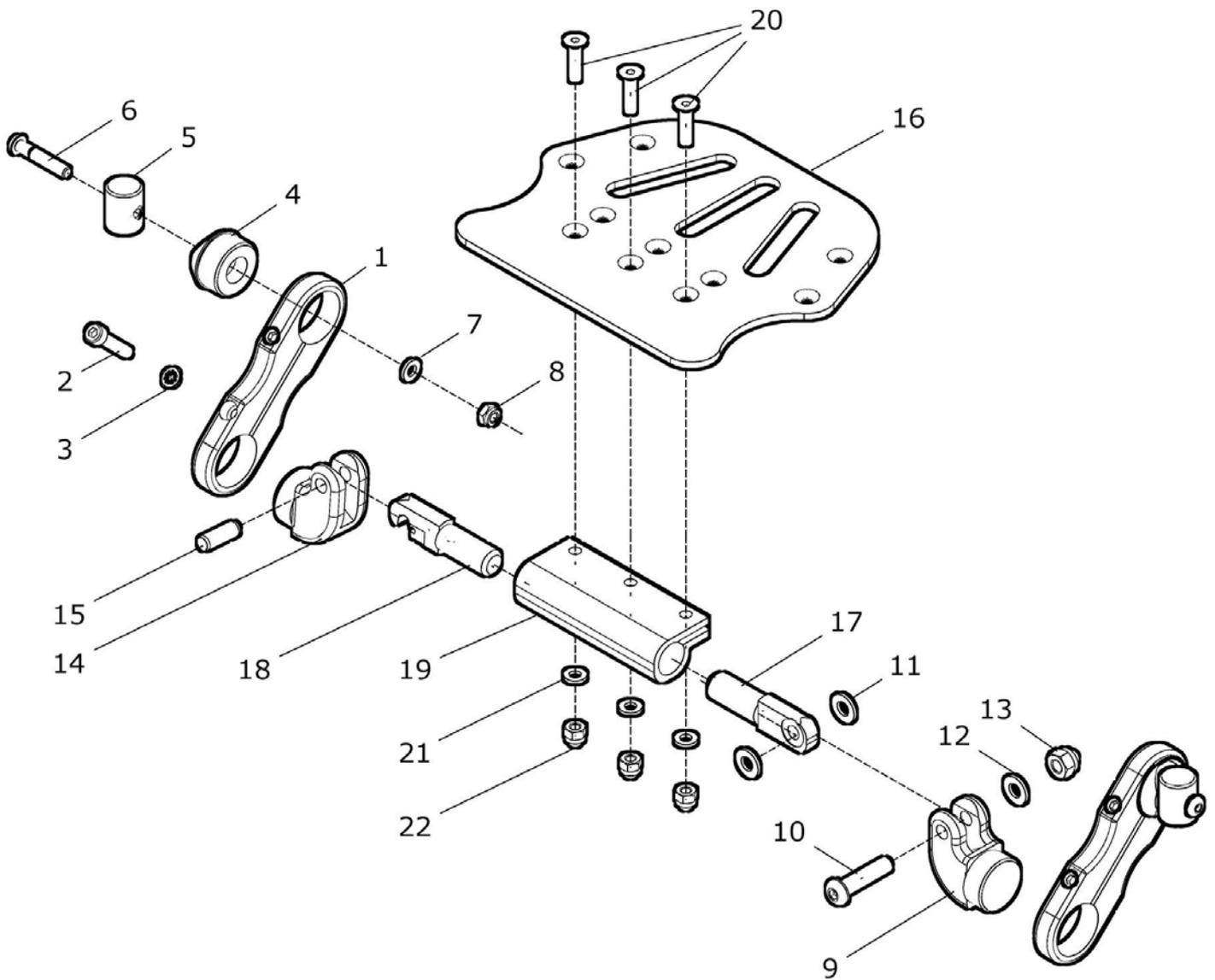


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 520 40	<b>Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert gerade kpl.</b> <b>Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u></b> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 22	22 520 45	<b>Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert Abduktion kpl.</b> <b>Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u></b> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a - 8	22 521 51	<b>Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	<b>Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	<b>Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	<b>Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl.</b> (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 22	22 524 00	<b>Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen mit Gelenkbolzen kpl.</b> <b>mit Drehgelenk und Hacken und Gelenkbolzen rechts und links</b> SB: ? FM: ?	1 St.
9 - 13	22 561 20	<b>Gelenkbolzen mit Linsenkopfschraube</b>	1 St.
9	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.

13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986		1 St.
<b>14 - 15</b>	<b>22 561 10</b>	<b>Gelenkbolzen mit Zylinderstift</b>		<b>1 St.</b>
14	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert		1 St.
15	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24		1 St.
<b>16 – 22</b>	<b>22 524 10</b>	<b>Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert mit Drehgelenk und Hacken</b> (ohne Gelenkbolzen) <b>kpl.</b> SB: ? FM: ?		<b>1 St.</b>
16a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ?	SB 26 – 28 Rahmen gerade SB 22 - 24 Abduktionsrahmen	1 St.
16b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ?	SB 30 – 32 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen	1 St.
16c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 34 – 36 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen	1 St.
16d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 38 – 40 Rahmen gerade SB 34 – 36 Abduktionsrahmen	1 St.
16e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 42 – 44 Rahmen gerade SB 38 – 42 Abduktionsrahmen	1 St.
17	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?		1 St.
18	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?		1 St.
19	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend		1 St.
20	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS		3 St.
21	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS		3 St.
22	01 210 73	Hut-Mutter M6 - DIN 986 ZNS		3 St.




## Wadenband

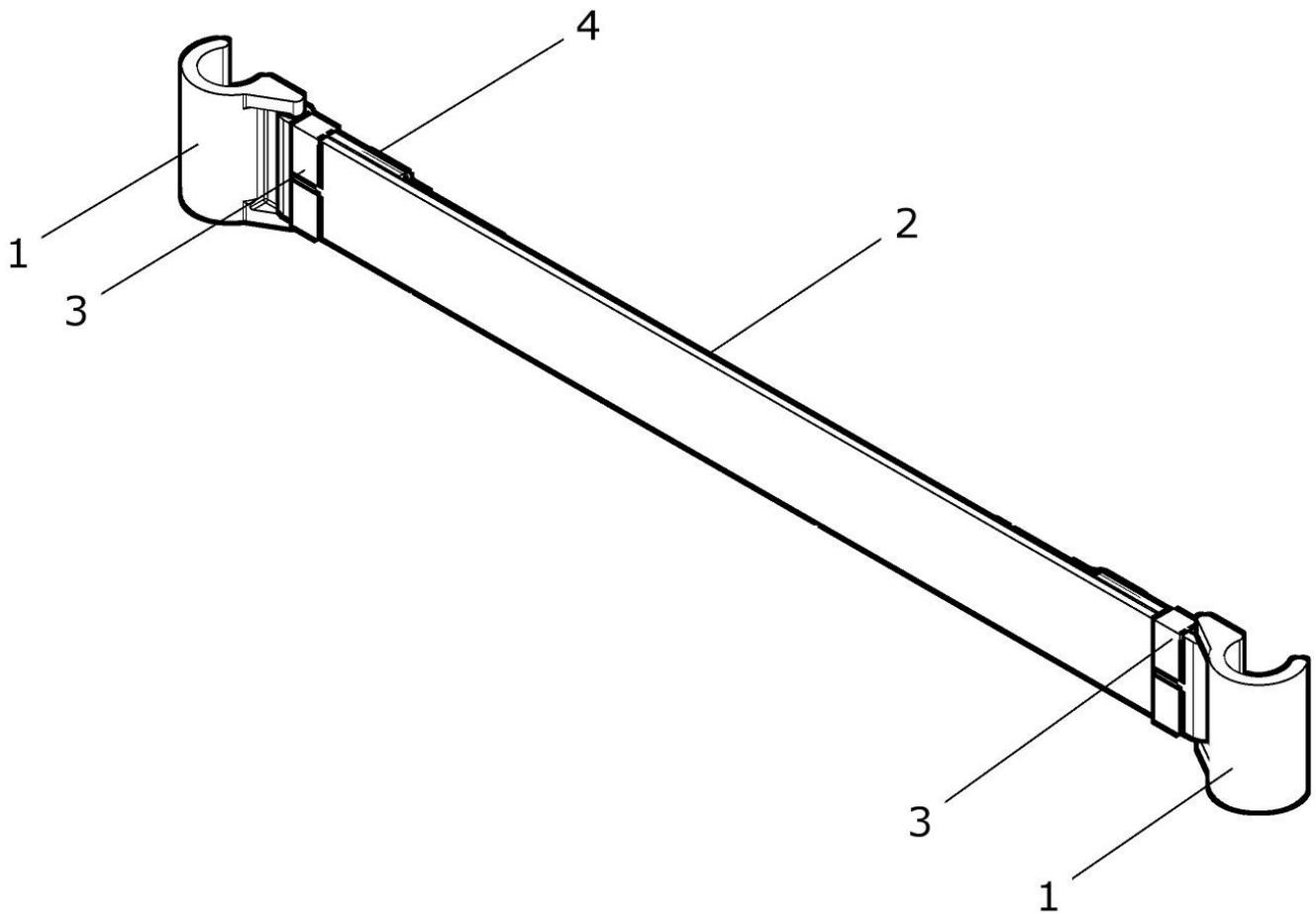

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 519 00	Wadenband mit Flausch und Y-Hook SB ... kpl. mit Wadenbandhalter und Gurtführung SB: ?	1 St.
1	50 519 01	Wadenbandhalter	2 St.
2	40 519 50	Wadenband (Flauschband) SB: ?	1 St.
3	04 220 03	Gurtführung	2 St.
4	04 220 61	Y-Hook	2 St.

**Fußbrett Platte durchgehend nach hinten hochklappbar**

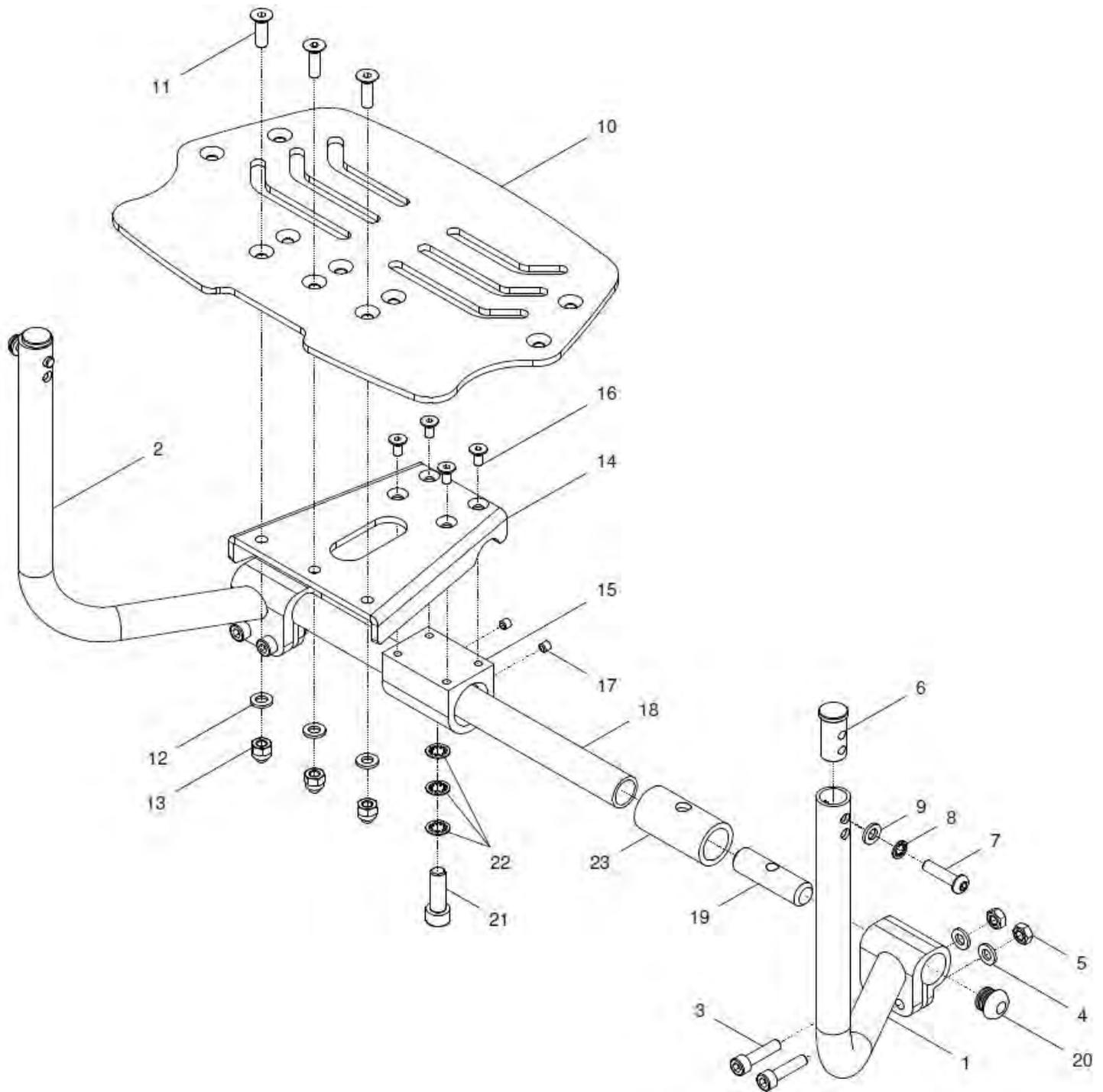

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge	
1 – 23	25 560 00	<b>Fußbrett Platte durchgehend hochklappbar 90°B / 30°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel 90°B / 30°V nach hinten hochklappbar für Lenkrad 4“ und 5“</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? USL: ? (ab 30cm)	1 St.	
1, 3 – 9	25 561 30	<b>Fußbrettbügel 90°B / 30°V links mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.	
2 – 9	25 561 20	<b>Fußbrettbügel 90°B / 30°V rechts mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.	
1	25 561 31	Fußbrettbügel 90°B / 30°V links	1 St.	
2	25 561 21	Fußbrettbügel 90°B / 30°V rechts	1 St.	
3	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912 A2	4 St.	
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.	
5	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986 A2	4 St.	
6	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.	
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.	
8	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.	
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.	
10 – 23	25 562 00	<b>Fußbrett Platte mit Achse bei 30°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Achse / Querrohr, mit Halteplatte und Buchse</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.	
10a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ?	SB 24 - 26 Rahmen gerade SB 20 Abduktionsrahmen	1 St.
10b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ?	SB 28 – 30 Rahmen gerade SB 22 – 24 Abduktionsrahmen	1 St.
10c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 32 – 34 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen	1 St.
10d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 36 – 38 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen	1 St.
10e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 40 – 42 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen	1 St.
11	01 120 83E	Senkschraube M6x16 - DIN 7991 ZNS	3 St.	
12	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.	
13	01 210 38	Mutter M6 - DIN 985 ZNS	3 St.	

14 – 23	25 562 10	<b>Halteplatte mit Achse bei 30°V</b> kpl. <b>Halteplatte mit Achse / Querrohr und Buchse</b> (ohne Fußbrett) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
14 – 17	85 561 90	<b>Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar</b> kpl. (ohne Querrohr / ohne KU-Buchse)	1 St.
14	85 561 91	Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar	1 St.
15	85 561 92	Achsaufnahme	1 St.
16	01 120 01A	Senkkopfschrauben mit I-kt. M5x10 - DIN 7991 A2	4 St.
17	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914 A2	2 St.
18 – 20	25 562 60	<b>Achse mit M8 für Fußbrett-Platte hochklappbar</b> kpl. (ohne Halteplatte / ohne KU-Buchse) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	1 St.
18	25 562 41	Achse für FB hochklappbar SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	1 St.
19	25 562 61	Befestigungsbolzen Ø14x50	1 St.
20	04 210 01	Verschlußstopfen d.19mm schwarz	2 St.
21	01 160 43	Zylinderkopfschraube M8x25 - DIN 912 A2	1 St.
22	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8	3 St.
23	25 562 21	Kunststoffhülse schwarz Ø25,5/Ø19x49	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 23	25 560 10	<b>Fußbrett Platte durchgehend hochklappbar 90°B / 50°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel 90°B / 50°V nach hinten hochklappbar für Lenkrad 6“ und 140mm</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? USL: ? (ab 30cm)	1 St.
1, 3 – 9	25 561 35	<b>Fußbrettbügel 90°B / 50°V links mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.
2 – 9	25 561 25	<b>Fußbrettbügel 90°B / 50°V rechts mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.
1	25 561 36	Fußbrettbügel 90°B / 50°V links	1 St.
2	25 561 26	Fußbrettbügel 90°B / 50°V rechts	1 St.
3	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912 A2	4 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986 A2	4 St.
6	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10 – 23	25 562 05	<b>Fußbrett Platte mit Achse bei 50°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Achse / Querrohr, mit Halteplatte und Buchse</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
10a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ?	SB 24 - 26 Rahmen gerade SB 20 Abduktionsrahmen 1 St.
10b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ?	SB 28 – 30 Rahmen gerade SB 22 – 24 Abduktionsrahmen 1 St.
10c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 32 – 34 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen 1 St.
10d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 36 – 38 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen 1 St.
10e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 40 – 42 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen 1 St.
11	01 120 83E	Senkschraube M6x16 - DIN 7991 ZNS	3 St.
12	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
13	01 210 38	Mutter M6 - DIN 985 ZNS	3 St.


<b>14 – 23</b>	<b>25 562 15</b>	<b>Halteplatte mit Achse bei 50°V kpl.</b> <b>Halteplatte mit Achse / Querrohr und Buchse</b> (ohne Fußbrett) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	<b>1 St.</b>
<b>14 – 17</b>	<b>85 561 90</b>	<b>Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar kpl.</b> (ohne Querrohr / ohne KU-Buchse)	<b>1 St.</b>
14	85 561 91	Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar	1 St.
15	85 561 92	Achsaufnahme	1 St.
16	01 120 01A	Senkkopfschrauben mit I-kt. M5x10 - DIN 7991 A2	4 St.
17	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914 A2	2 St.
<b>18 – 20</b>	<b>25 562 60</b>	<b>Achse mit M8 für Fußbrett-Platte hochklappbar kpl.</b> (ohne Halteplatte / ohne KU-Buchse) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	<b>1 St.</b>
18	25 562 41	Achse für FB hochklappbar SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	1 St.
19	25 562 61	Befestigungsbolzen Ø14x50	1 St.
20	04 210 01	Verschlußstopfen d.19mm schwarz	2 St.
21	01 160 43	Zylinderkopfschraube M8x25 - DIN 912 A2	1 St.
22	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8	3 St.
23	25 562 21	Kunststoffhülse schwarz Ø25,5/Ø19x49	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 23	25 560 50	<b>Fußbrett Platte durchgehend hochklappbar 60°B / 30°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel 60°B / 30°V nach hinten hochklappbar für Lenkrad 4“ und 5“</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? USL: ? (ab 25cm)	1 St.
1, 3 – 9	25 561 70	<b>Fußbrettbügel 60°B / 30°V links mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.
2 – 9	25 561 60	<b>Fußbrettbügel 60°B / 30°V rechts mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.
1	25 561 71	Fußbrettbügel 60°B / 30°V links	1 St.
2	25 561 61	Fußbrettbügel 60°B / 30°V rechts	1 St.
3	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912 A2	4 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986 A2	4 St.
6	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10 – 23	25 562 00	<b>Fußbrett Platte mit Achse bei 30°V kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Achse / Querrohr, mit Halteplatte und Buchse</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
10a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ?	SB 24 - 26 Rahmen gerade SB 20 Abduktionsrahmen 1 St.
10b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ?	SB 28 – 30 Rahmen gerade SB 22 – 24 Abduktionsrahmen 1 St.
10c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 32 – 34 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen 1 St.
10d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 36 – 38 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen 1 St.
10e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 40 – 42 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen 1 St.
11	01 120 83E	Senkschraube M6x16 - DIN 7991 ZNS	3 St.
12	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
13	01 210 38	Mutter M6 - DIN 985 ZNS	3 St.

14 – 23	25 562 10	<b>Halteplatte mit Achse bei 30°V kpl.</b> <b>Halteplatte mit Achse / Querrohr und Buchse</b> (ohne Fußbrett) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
14 – 17	85 561 90	<b>Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar kpl.</b> (ohne Querrohr / ohne KU-Buchse)	1 St.
14	85 561 91	Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar	1 St.
15	85 561 92	Achsaufnahme	1 St.
16	01 120 01A	Senkkopfschrauben mit I-kt. M5x10 - DIN 7991 A2	4 St.
17	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914 A2	2 St.
18 – 20	25 562 60	<b>Achse mit M8 für Fußbrett-Platte hochklappbar kpl.</b> (ohne Halteplatte / ohne KU-Buchse) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	1 St.
18	25 562 41	Achse für FB hochklappbar SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	1 St.
19	25 562 61	Befestigungsbolzen Ø14x50	1 St.
20	04 210 01	Verschlußstopfen d.19mm schwarz	2 St.
21	01 160 43	Zylinderkopfschraube M8x25 - DIN 912 A2	1 St.
22	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8	3 St.
23	25 562 21	Kunststoffhülse schwarz Ø25,5/Ø19x49	1 St.



**Fußbrett Platte durchgehend nach hinten hochklappbar und arretierbar**

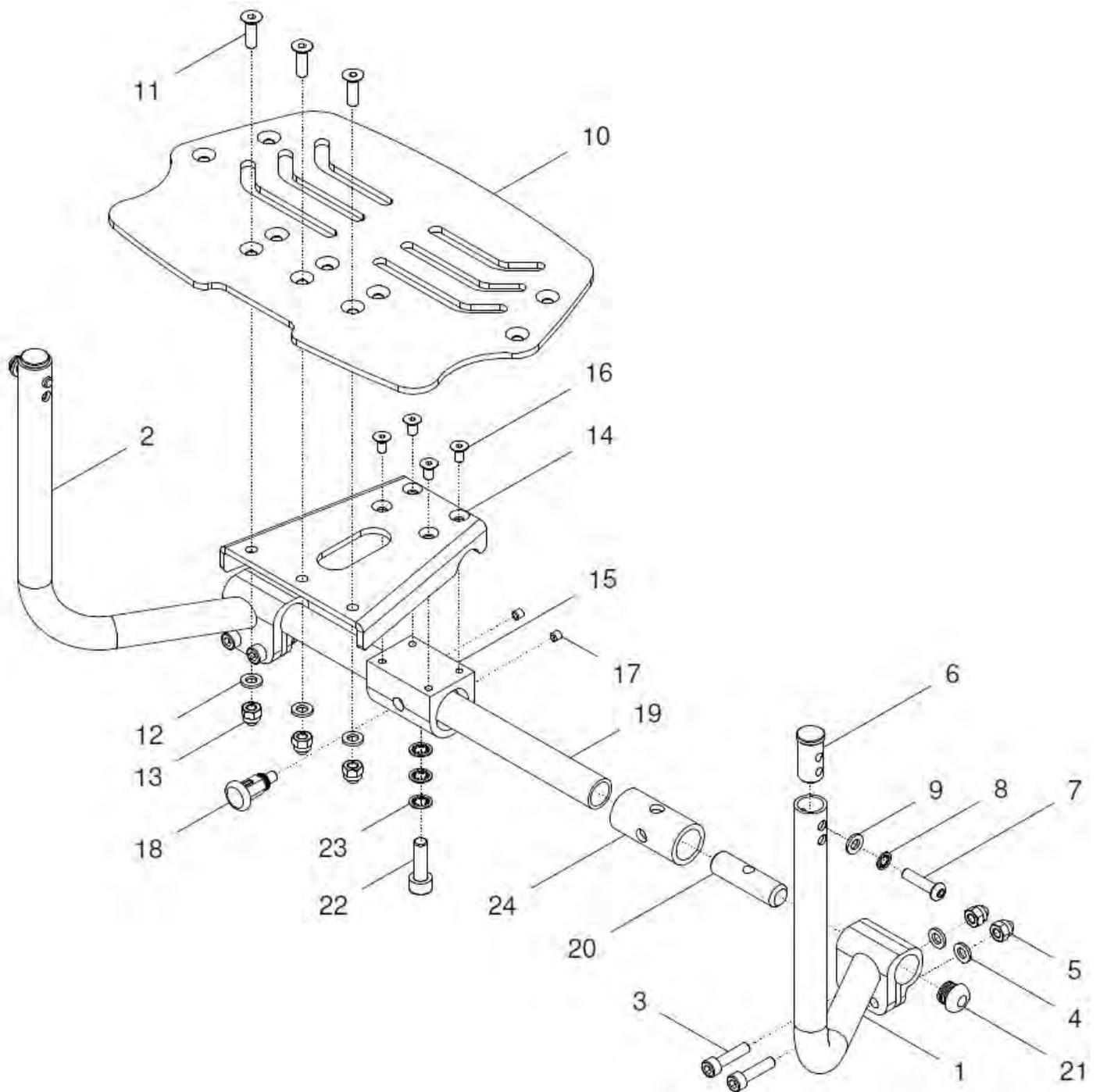


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge	
1 – 24	25 563 00	<b>Fußbrett Platte dhgd. hochklappbar 90°B / 30°V / Arretierung kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Fußbrettbügel 90°B / 30°V nach hinten hochklappbar und mit Arretierbolzen fixierbar für Lenkrad 4“ und 5“</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? USL: ? (ab 30cm)	1 St.	
1, 3 – 9	25 561 30	<b>Fußbrettbügel 90°B / 30°V links mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.	
2 – 9	25 561 20	<b>Fußbrettbügel 90°B / 30°V rechts mit Klemmaufnahme und Bolzen</b> kpl.	1 St.	
1	25 561 31	Fußbrettbügel 90°B / 30°V links	1 St.	
2	25 561 21	Fußbrettbügel 90°B / 30°V rechts	1 St.	
3	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912 A2	4 St.	
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.	
5	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986 A2	4 St.	
6	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.	
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.	
8	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.	
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.	
10 – 24	25 563 20	<b>Fußbrett Platte mit Achse bei 30°V / Arretierung kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Achse / Querrohr, mit Halteplatte und Buchse</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.	
10a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ?	SB 24 - 26 Rahmen gerade SB 20 Abduktionsrahmen	1 St.
10b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ?	SB 28 – 30 Rahmen gerade SB 22 – 24 Abduktionsrahmen	1 St.
10c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ?	SB 32 – 34 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen	1 St.
10d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ?	SB 36 – 38 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen	1 St.
10e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ?	SB 40 – 42 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen	1 St.
11	01 120 83E	Senkschraube M6x16 - DIN 7991 ZNS	3 St.	
12	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.	
13	01 210 38	Mutter M6 - DIN 985 ZNS	3 St.	

14 – 24	25 563 30	<b>Halteplatte mit Achse bei 30°V / Arretierung</b> <b>Halteplatte mit Achse / Querrohr und Buchse</b> (ohne Fußbrett) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	kpl.	1 St.
14 – 18	25 563 40	<b>Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar</b> (ohne Querrohr / ohne KU-Buchse)	kpl.	1 St.
14	85 561 91	Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar		1 St.
15	25 563 41	Achsaufnahme mit M10x1		1 St.
16	01 120 01A	Senkkopfschrauben mit I-kt. M5x10 - DIN 7991 A2		4 St.
17	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914 A2		2 St.
18	01 133 22	Arretierbolzen mit Rastnut (M10x1)		1 St.
19 – 24	25 563 80	<b>Achse M8 / Ø6,5 f. Fußbrett-Platte hochklappbar / fixierbar</b> (ohne Halteplatte) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)	kpl.	1 St.
19	25 563 21	Achse für FB hochklappbar und fixierbar (mit Bohrung Ø6,5) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FB-Bügel mit Verdrehwinkel: ? (30° oder 50°)		1 St.
20	25 562 61	Befestigungsbolzen Ø14x50		1 St.
21	04 210 01	Verschlußstopfen d.19mm schwarz		2 St.
22	01 160 43	Zylinderkopfschraube M8x25 - DIN 912 A2		1 St.
23	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8		3 St.
24	25 563 22	Kunststoffhülse schwarz Ø25,5/Ø19x49 und fixierbar (mit Bohrung Ø6,5)		1 St.



**Fußbrett Platte durchgehend nach hinten hochklappbar  
im Rahmen montiert**

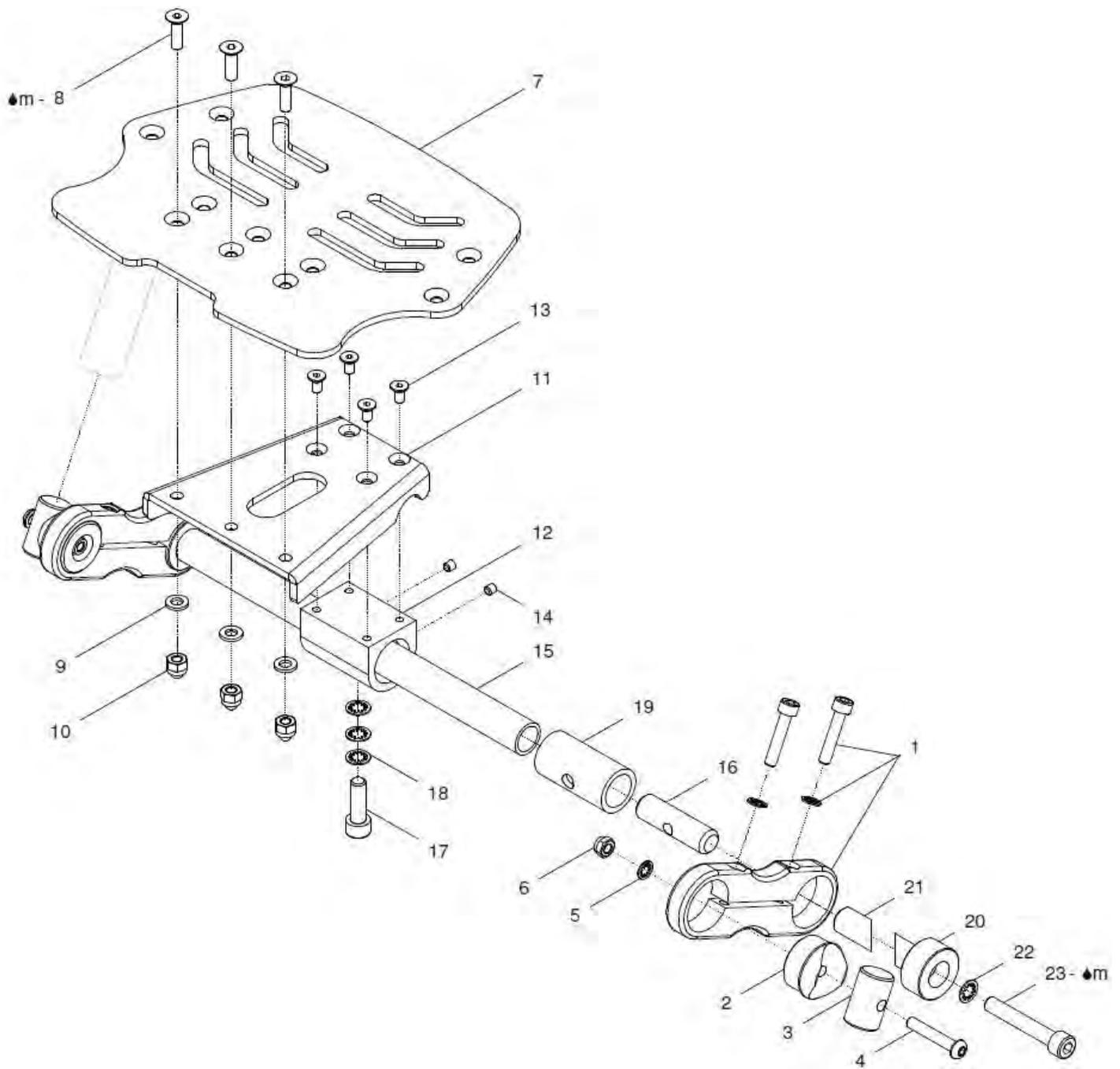

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 23	25 564 00	<b>Fußbrett Platte durchgehend im Rahmen / hochklappbar kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Klemmlaschen im Rahmen montiert nach hinten hochklappbar</b> FM: ? SB: ? (gerade ab SB 28cm / Abduktion ab SB 22cm) Rahmenform: gerade / Abduktion ? USL: ? (12 - 33cm)	1 St.
1a - 6	22 521 52	<b>Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 6	22 521 56	<b>Klemmlasche 115mm im Rahmen montiert kpl.</b> Klemmlasche 115mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1b	22 521 06	Klemmlasche 115mm	2 St.
2 - 6	22 521 20	<b>Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl.</b> (ohne Klemmlasche)	2 Set
2	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
(2b)	25 521 01	Sonder-Aufnahmebolzen Ø23mm halbseitig (für unterste Bohrung)	2 St.
3	22 521 08	Verstärkungsbolzen für Aufnahme im Rahmen	2 St.
4	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
5	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
6	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	2 St.
7 – 23	25 564 80	<b>Fußbrett Platte mit Achse f. FB im Rahmen / hochklappbar kpl.</b> <b>Fußbrett Platte mit Achse / Querrohr f. FB im Rahmen mit Halteplatte und Buchse</b> FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
7a	85 515 19	Fußbrett-Platte 160 FM: ? SB 24 - 26 Rahmen gerade SB 20 Abduktionsrahmen	1 St.
7b	85 515 11	Fußbrett-Platte 200 FM: ? SB 28 – 30 Rahmen gerade SB 22 – 24 Abduktionsrahmen	1 St.
7c	85 515 12	Fußbrett-Platte 240 FM: ? SB 32 – 34 Rahmen gerade SB 26 – 28 Abduktionsrahmen	1 St.
7d	85 515 13	Fußbrett-Platte 280 FM: ? SB 36 – 38 Rahmen gerade SB 30 – 32 Abduktionsrahmen	1 St.
7e	85 515 14	Fußbrett-Platte 320 FM: ? SB 40 – 42 Rahmen gerade SB 34 – 38 Abduktionsrahmen	1 St.
8	01 120 83E	Senkschraube M6x16 - DIN 7991 ZNS	3 St.
9	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	3 St.
10	01 210 38	Mutter M6 - DIN 985 ZNS	3 St.

<b>11 – 23</b>	<b>25 564 50</b>	<b>Halteplatte mit Achse für FB im Rahmen / hochklappbar kpl.</b> <b>Halteplatte mit Achse / Querrohr und Buchse</b> (ohne Fußbrett) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	<b>1 St.</b>
<b>11 – 14</b>	<b>85 561 90</b>	<b>Halteplatte für FB-Platte im Rahmen / hochklappbar kpl.</b> (ohne Querrohr / ohne KU-Buchse)	<b>1 St.</b>
11	85 561 91	Halteplatte für Fußbrett-Platte hochklappbar	1 St.
12	85 561 92	Achsaufnahme	1 St.
13	01 120 01A	Senkkopfschrauben mit I-kt. M5x10 - DIN 7991 A2	4 St.
14	01 131 09	Gewindestift M5x5 - DIN 914 A2	2 St.
<b>15 – 16</b>	<b>25 564 20</b>	<b>Achse mit M8 für FB-Platte im Rahmen / hochklappbar kpl.</b> (ohne Halteplatte / ohne KU-Buchse) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	<b>1 St.</b>
15	25 564 21	Achse Ø18,7 für FB im Rahmen hochklappbar SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
16	25 562 61	Befestigungsbolzen Ø14x50	1 St.
17	01 160 43	Zylinderkopfschraube M8x25 - DIN 912 A2	1 St.
18	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8	3 St.
19	25 562 21	Kunststoffhülse schwarz Ø25,5/Ø19x49	1 St.
<b>20 - 23</b>	<b>25 564 10</b>	<b>ZB Klemmbolzen mit Klemmteil kpl.</b>	<b>2 St.</b>
20	25 564 11	Klemmbolzen für FB-Querrohr	2 St.
21	25 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
22	01 330 02	Schnorr Sicherungsscheibe NM8	2 St.
23	01 160 47A	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912 A2	2 St.






# Räder


## Gruppe 6

**Lochplatte kurz FILOU Rahmen H1 (außen montiert) 3° - 10° Sturz**

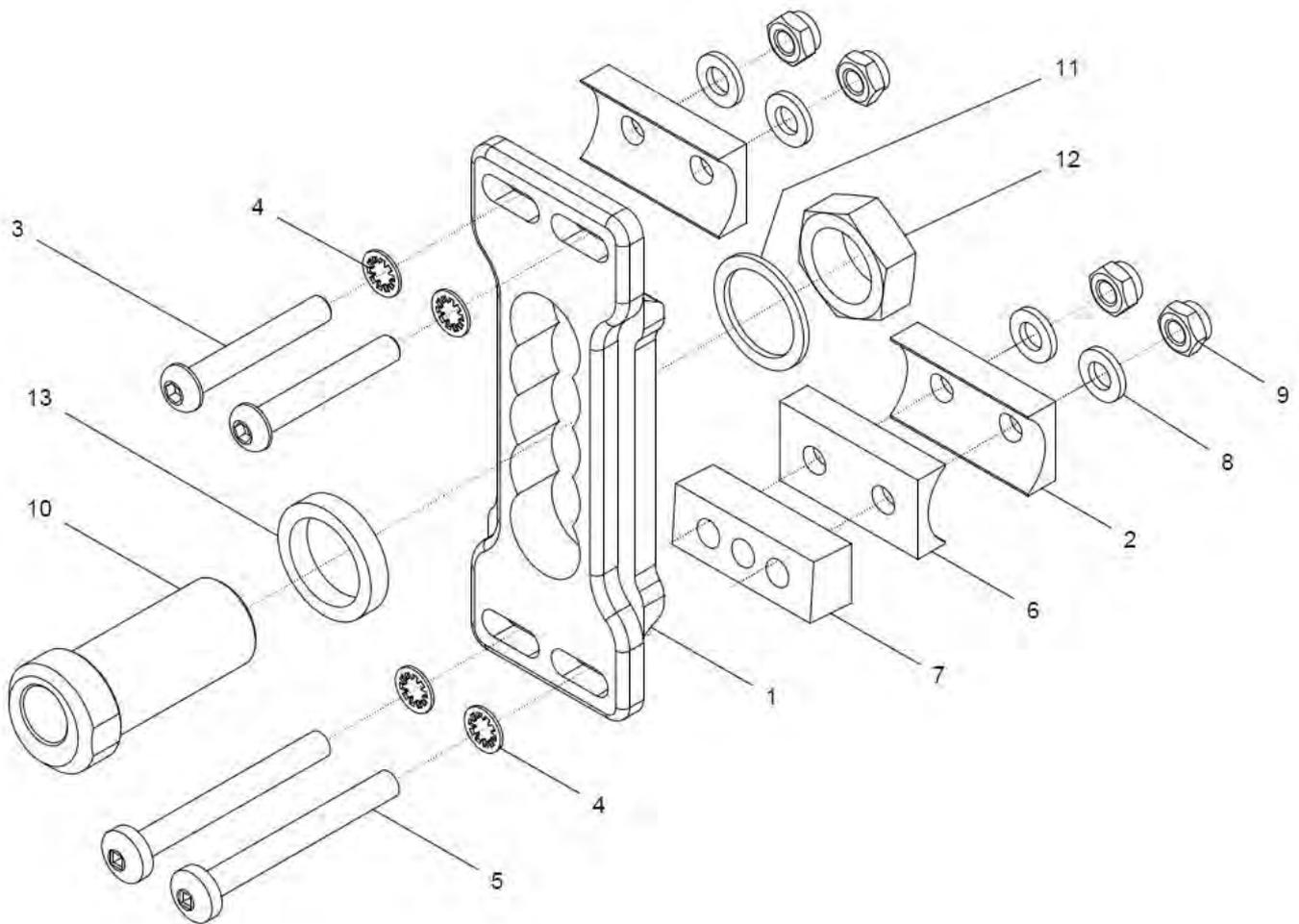


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	28 621 10	<b>Lochplatte kurz FILOU außen montiert 3°/5°/7°/10°-Sturz kpl.</b> <b>Lochplatte FILOU mit Halbschalen und Schrauben</b> Sturz: ? (für 3°, 5°, 7° oder 10°)	2 St.
1	28 621 01	Lochplatte kurz FILOU (für Rahmen H1)	2 St.
2 – 5a, 8 - 9	28 621 93	<b>Montageset H1 Sturz 3° für Einschraubadapter kurz</b>	2 St.
2 – 5a, 6, 8 - 9	28 621 95	<b>Montageset H1 Sturz 5° für Einschraubadapter kurz</b>	2 St.
2 – 5b, 6, 7a - 9	28 621 97	<b>Montageset H1 Sturz 7° für Einschraubadapter lang</b>	2 St.
2 – 5c, 6, 7b - 9	28 621 98	<b>Montageset H1 Sturz 10° für Einschraubadapter lang</b>	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5	4 St.
3	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	4 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
5a	01 153 26	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x40 Sturz 3°, 5°	4 St.
5b	01 153 28	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x50 Sturz 7°	4 St.
5c	01 153 29	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x55 Sturz 10°	4 St.
6	50 621 02	Halbschale 6,5 (nicht bei 3° Sturz)	2 St.
zu 7	-----	ohne Distanz Sturz 3°, 5°	-
7a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7249 A2 Sturz 7°	8 St.
7b	50 621 06	Distanzblock 12mm Sturz 10°	2 St.
8	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	8 St.
9	01 210 03	Mutter DIN 985 M6 A4	8 St.
<b>10a - 13</b>	<b>25 621 20</b>	<b>Einschraubadapter kurz (mit 3° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> <b>für Montage-Set 3°- und 5°-Sturz</b>	<b>2 St.</b>
10a	25 621 24	Einschraubadapter kurz (3°) FINDUS	2 St.
11	01 330 08	Schnorr-Scheibe NM 20	2 St.
12	25 621 21	Mutter M20x1,5 (SW 24) A2	2 St.
13a	25 621 03	Buchse 10mm (20,2x10x27) Sturz 3°, 5°, 10°	2 St.
<b>10b - 13</b>	<b>25 621 40</b>	<b>Einschraubadapter lang (mit 2° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> <b>für Montage-Set 7°- und 10°-Sturz</b> Sturz: ?	<b>2 St.</b>
10b	25 621 45	Einschraubadapter lang (2°) FINDUS	2 St.
13b	25 621 02	Buchse 5mm ( 20,2x5x27) Sturz 7°	2 St.

**Lochplatte kurz FILOU Rahmen H1 (außen montiert) 0°-Sturz**

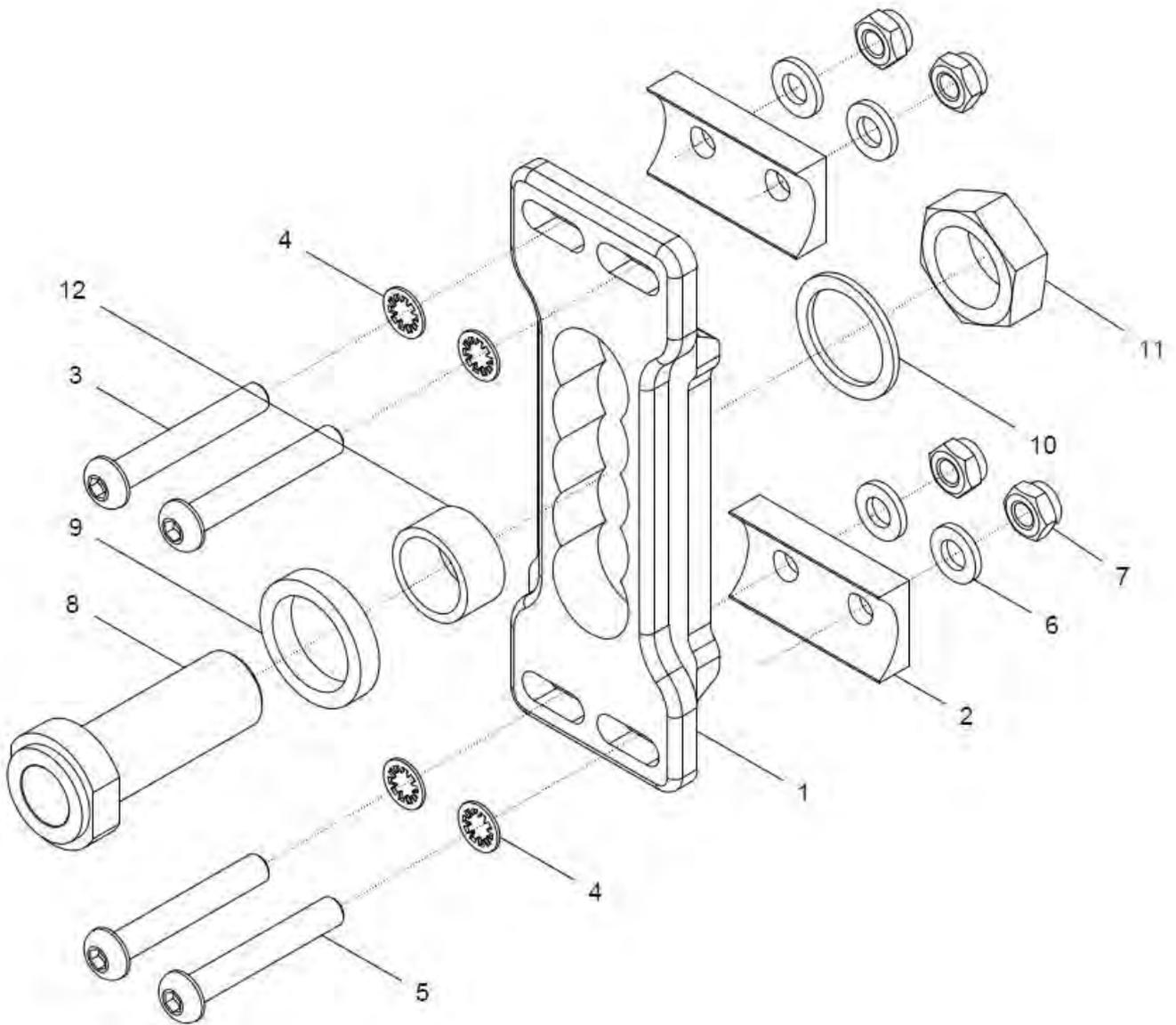


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1 – 7</b>	<b>28 621 20</b>	<b>Lochplatte kurz FILOU außen montiert 0°-Sturz</b> <b>Lochplatte FILOU mit Halbschalen und Schrauben</b> Sturz: 0°	<b>kpl.</b> <b>2 St.</b>
1	28 621 01	Lochplatte kurz FILOU (für Rahmen H1)	2 St.
<b>2 – 7</b>	<b>28 621 90</b>	<b>Montageset Sturz 0°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 02	Halbschale 6,5	4 St.
3	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	4 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
5	01 153 26	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x40	Sturz 0° 4 St.
6	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	8 St.
7	01 210 03	Mutter DIN 985 M6 A4	8 St.
<b>8 - 12</b>	<b>25 621 85</b>	<b>Einschraubadapter 0° FINDUS</b>	<b>kpl.</b> <b>2 St.</b>
8	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm (16x6x25)	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM 16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1 A2	2 St.
12	25 661 22	Buchse 10mm (Ø20xØ16x10) für Bohrung Lochplatte	2 St.

**Lochplatte FILOU Rahmen H2 (außen montiert) 3° - 10° Sturz**

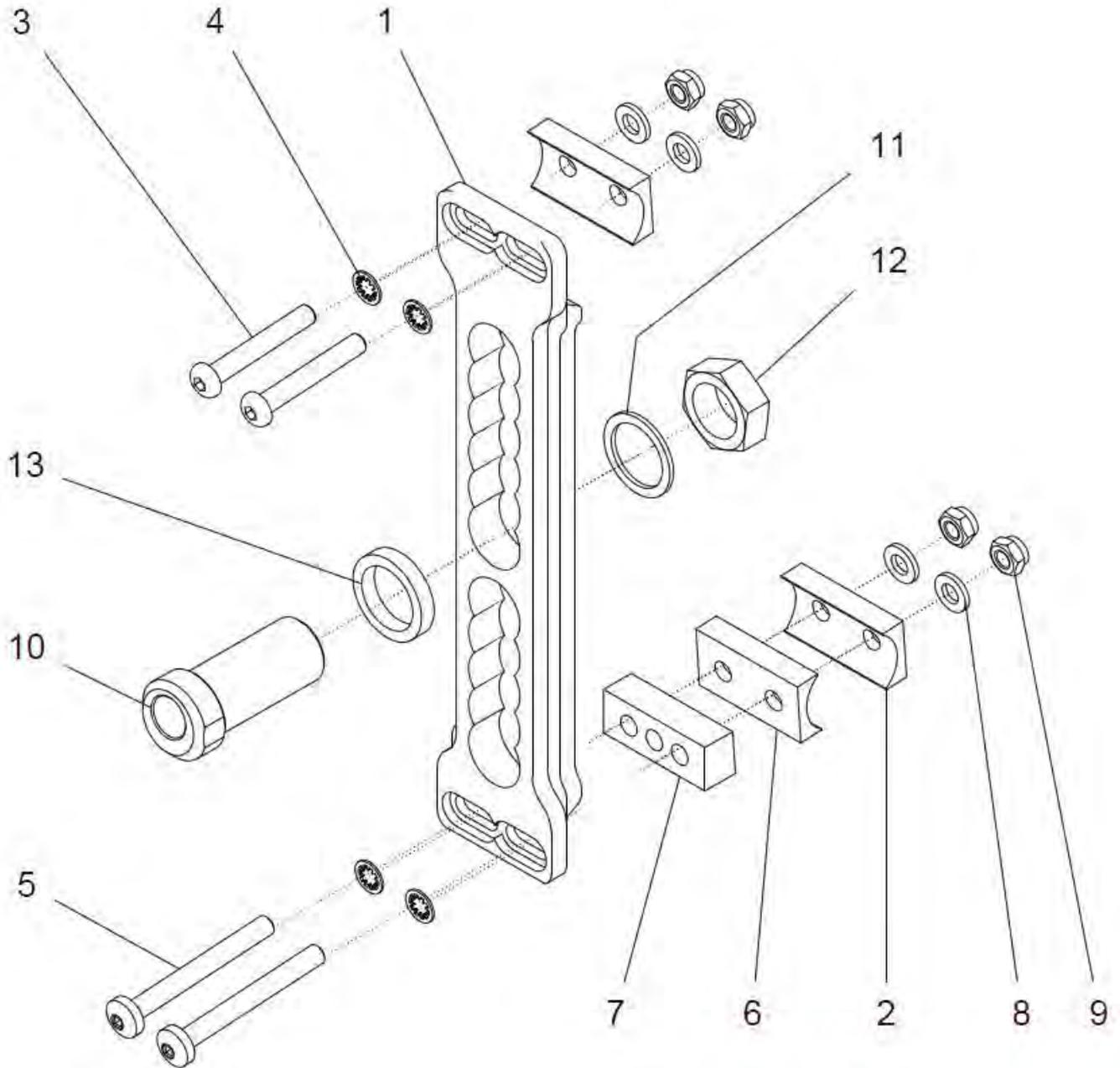


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung			Menge
1 – 9	28 622 10	<b>Lochplatte FINDUS / FILOU außen montiert 3°/5°/7°/10°-Sturz kpl.</b> <b>Lochplatte FINDUS / FILOU mit Halbschalen und Schrauben</b> Sturz: ? (für 3°, 5°, 7° oder 10°)			2 St.
1	25 621 11	Lochplatte FINDUS / FILOU H2			2 St.
2 – 5a, 8 - 9	28 622 93	<b>Montageset H2</b>	<b>Sturz 3°</b>	<b>für Einschraubadapter kurz</b>	2 St.
2 – 5a, 6, 8 - 9	28 622 95	<b>Montageset H2</b>	<b>Sturz 5°</b>	<b>für Einschraubadapter kurz</b>	2 St.
2 – 5b, 6, 7a - 9	28 622 97	<b>Montageset H2</b>	<b>Sturz 7°</b>	<b>für Einschraubadapter lang</b>	2 St.
2 – 5c, 6, 7b - 9	28 622 98	<b>Montageset H2</b>	<b>Sturz 10°</b>	<b>für Einschraubadapter lang</b>	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5			4 St.
3	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz			4 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6			8 St.
5a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	Sturz 3°, 5°		4 St.
5b	01 153 29	Linsenkopfschraube M6x55 - ISO 7380 vz	Sturz 7°		4 St.
5c	01 153 31	Linsenkopfschraube M6x65 - ISO 7380 vz	Sturz 10°		4 St.
6	50 621 02	Halbschale 6,5 (nicht bei 3° Sturz)			2 St.
zu 7	-----	ohne Distanz		Sturz 3°, 5°	-
7a	50 621 06	Distanzblock 12mm		Sturz 7°	2 St.
7b	50 621 07	Distanzblock 22mm		Sturz 10°	2 St.
8	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4			8 St.
9	01 210 03	Mutter DIN 985 M6 A4			8 St.
<b>10a - 13</b>	<b>25 621 20</b>	<b>Einschraubadapter kurz (mit 3° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> <b>für Montage-Set 3°- und 5°-Sturz</b>			<b>2 St.</b>
10a	25 621 24	Einschraubadapter kurz (3°) FINDUS			2 St.
11	01 330 08	Schnorr-Scheibe NM 20			2 St.
12	25 621 21	Mutter M20x1,5 (SW 24) A2			2 St.
13a	25 621 03	Buchse 10mm (20,2x10x27)	Sturz 3°, 5°, 10°		2 St.
<b>10b - 13</b>	<b>25 621 40</b>	<b>Einschraubadapter lang (mit 2° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> <b>für Montage-Set 7°- und 10°-Sturz</b> Sturz: ?			<b>2 St.</b>
10b	25 621 45	Einschraubadapter lang (2°) FINDUS			2 St.
13b	25 621 02	Buchse 5mm (20,2x5x27)	Sturz 7°		2 St.

**Lochplatte FILOU Rahmen H2 (außen montiert) 0°-Sturz**

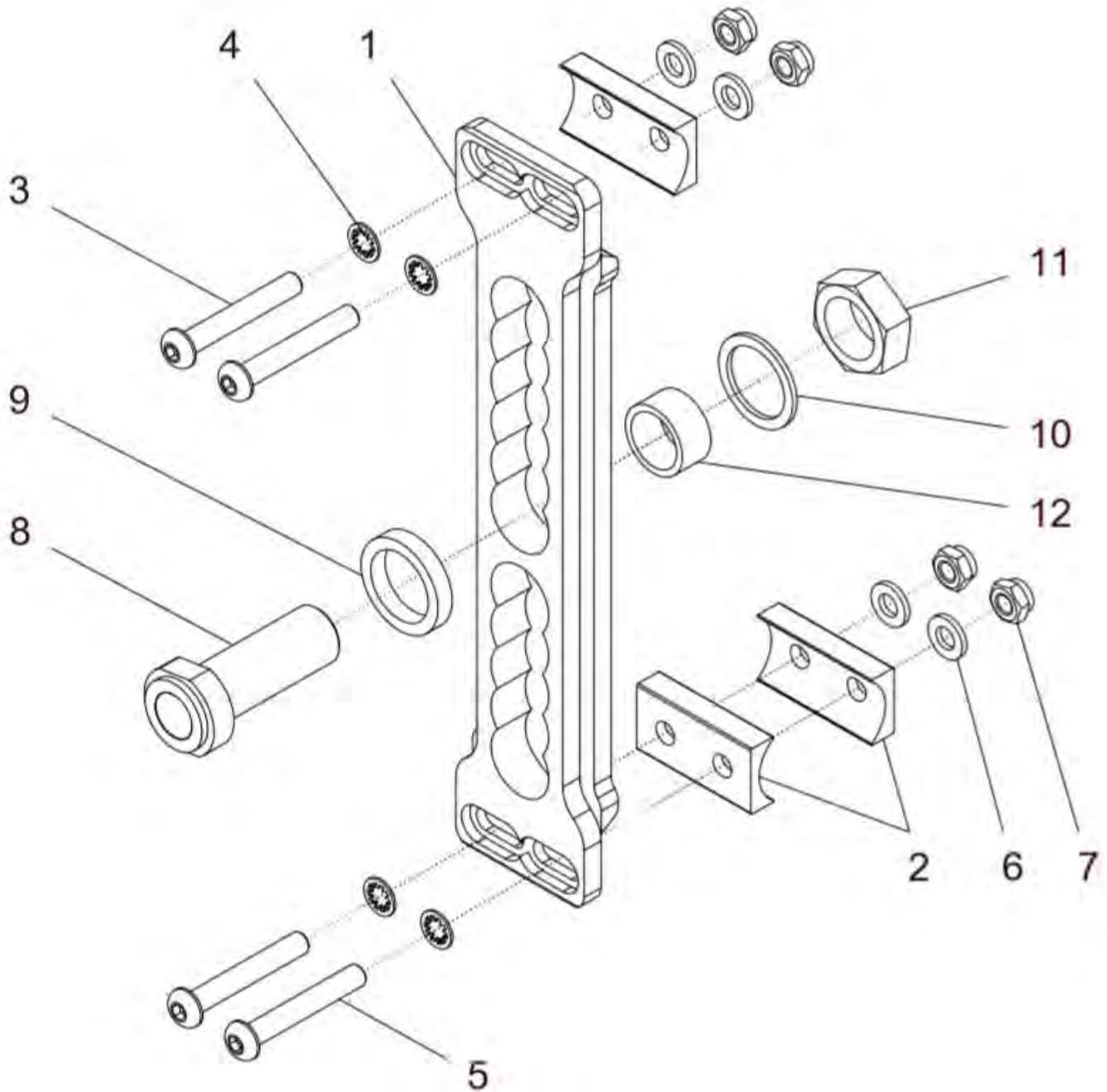

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1 – 7</b>	<b>28 622 20</b>	<b>Lochplatte FINDUS / FILOU außen montiert 0°-Sturz kpl.</b> Lochplatte FINDUS / FILOU mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 0°	<b>2 St.</b>
1	25 621 11	Lochplatte FINDUS / FILOU H2	2 St.
<b>2 – 7</b>	<b>28 622 90</b>	<b>Montageset Sturz 0°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 02	Halbschale 6,5	6 St.
3	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	4 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
5	01 153 26	Linsenkopfschraube ISO 7380 M6x40 Sturz 0°	4 St.
6	01 320 02	Scheibe DIN 125 6,4	8 St.
7	01 210 03	Mutter DIN 985 M6 A4	8 St.
<b>8 - 12</b>	<b>25 621 85</b>	<b>Einschraubadapter 0° FINDUS kpl.</b>	<b>2 St.</b>
8	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm (16x6x25)	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM 16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1 A2	2 St.
12	25 661 22	Buchse 10mm (Ø20xØ16x10) für Bohrung Lochplatte	2 St.

### Antriebsrad Standard (Alu-Nabe schwarz)

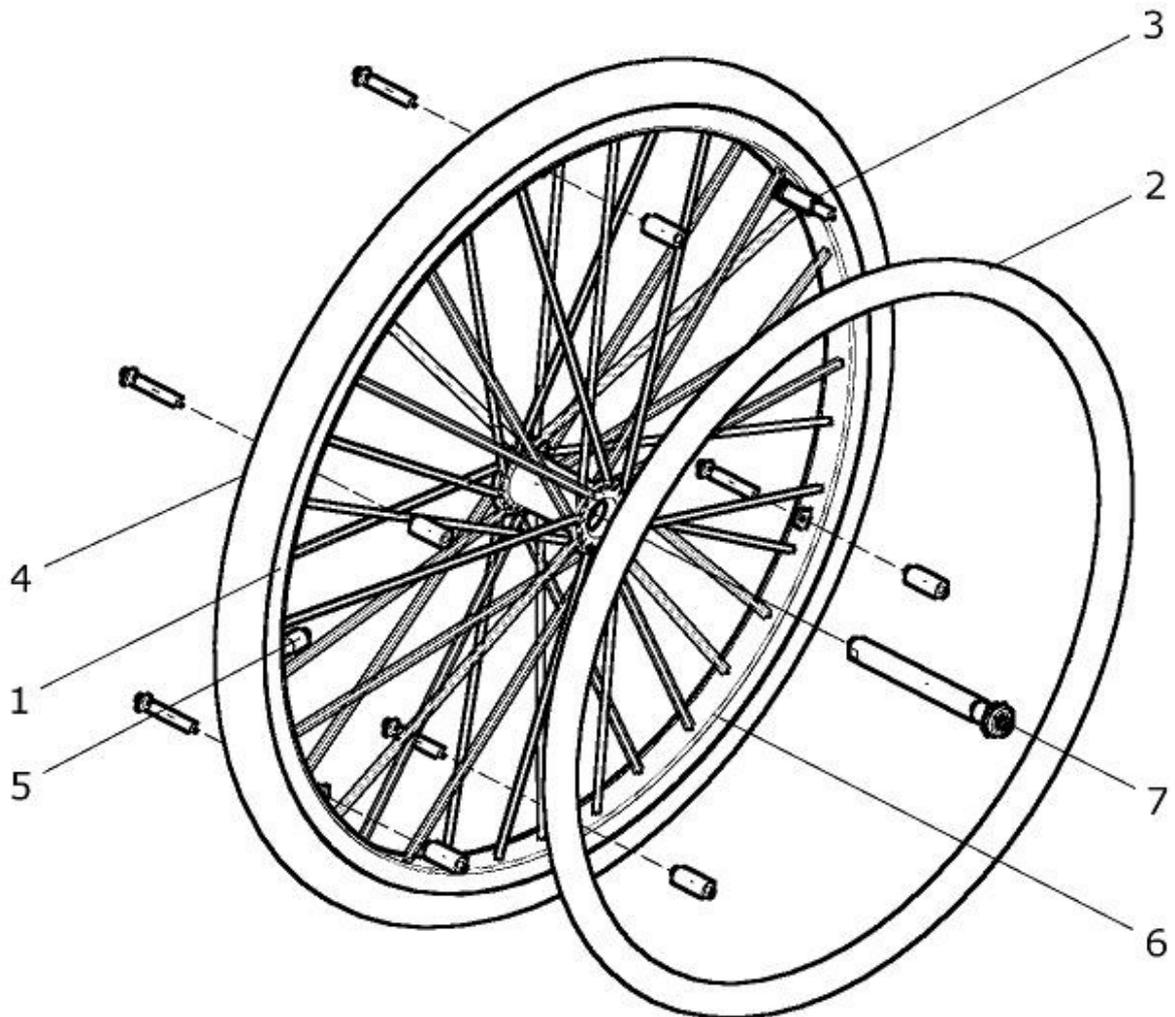

## Antriebsrad Standard 24 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 620 81	<b>Antriebsrad 24"x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24"x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 84	<b>Antriebsrad 24"x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 80	<b>Antriebsrad 24"x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24"x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 82	<b>Antriebsrad 24"x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24"x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 83	<b>Antriebsrad 24"x1 Edelstahl / Pannensicher grau</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24"x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 85	<b>Antriebsrad 24"x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24"x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 86	<b>Antriebsrad 24"x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 87	<b>Antriebsrad 24"x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24"x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 88	<b>Antriebsrad 24"x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau</b> kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24"x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	50 620 15	<b>Antriebsrad 24"x1 Luftbereifung feinprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b, 5b – 6	50 620 10	<b>Antriebsrad 24"x1 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	50 620 00	<b>Antriebsrad 24"x1 3/8 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4h – 6	50 620 20	<b>Antriebsrad 24“x1 Pannensicher grau</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g – 6	50 620 22	<b>Antriebsrad 24“x1 3/8 Pannensicher grau</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 626 00	Speichenrad 24“ (gekreuzt gespeicht und schwarze Nabe 1/2“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2a – 3b	50 623 85	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2b – 3a	50 623 00	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2b – 3b	50 623 30	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2c – 3a	50 623 50	<b>Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2a – 3c	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau super eng kpl.</b>	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber eloxiert	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 58	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

### Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.

## Antriebsrad Standard 22 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	10 610 86	<b>Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 89	<b>Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 85	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 87	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 88	<b>Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Pannensicher grau</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 82	<b>Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 83	<b>Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 81	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 84	<b>Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau</b> kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 80	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau</b> kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	10 610 10	<b>Antriebsrad 22“x1 Luftbereifung feinprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	10 610 00	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4e – 6	10 610 20	<b>Antriebsrad 22“x1 3/8 Pannensicher grau</b> (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.

1	10 616 00	Speichenrad 22" (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2") (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	<b>Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2a – 3b	10 613 85	<b>Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2b – 3a	10 613 00	<b>Greifring 22" Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2b – 3b	10 613 30	<b>Greifring 22" Edelstahl / Anbau weit kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2c – 3a	10 613 50	<b>Greifring 22" Aluminium silber / Anbau eng kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2a	10 613 56	Greifring 22" Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22" Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22" Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 58	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 122 41	Laufdecke 22" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22" x 1" grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22" x 1" pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

### Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22" CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22" CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22" TETRA-GRIP	1 St.

## Antriebsrad Standard 20 Zoll (Alu-Nabe schwarz)


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1, 2a – 4b, 5b – 6	30 630 82	<b>Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4c, 5b – 6	30 630 83	<b>Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftber. SENTINEL schwarz kpl.</b> mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 SENTINEL schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4a, 5a – 6	30 630 85	<b>Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.</b> mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4d, 6	30 630 86	<b>Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl.</b> mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4e, 6	30 630 87	<b>Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl.</b> mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4f, 6	30 630 88	<b>Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher schwarz kpl.</b> mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	30 630 05	<b>Antriebsrad 20“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4c	30 630 06	<b>Antriebsrad 20“x1 3/8 Pannensicher grau</b> (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1, 2a, 3a	30 630 90	<b>Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz eng /ohne Bereifung kpl.</b> Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2a, 3b	30 630 91	<b>Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz weit /ohne Bereifung kpl.</b> Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3a	30 630 92	<b>Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl eng / ohne Bereifung kpl.</b> Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3b	30 630 93	<b>Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl weit / ohne Bereifung kpl.</b> Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.
1	30 631 05	Speichenrad 20“ (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2“) (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.

<b>2a – 3a</b>	<b>30 633 20</b>	<b>Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng</b> kpl.	<b>1 St.</b>
<b>2a – 3b</b>	<b>30 633 40</b>	<b>Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit</b> kpl.	<b>1 St.</b>
<b>2b – 3a</b>	<b>30 633 15</b>	<b>Greifring 20“ Edelstahl / Anbau eng</b> kpl.	<b>1 St.</b>
<b>2b – 3b</b>	<b>30 633 30</b>	<b>Greifring 20“ Edelstahl / Anbau weit</b> kpl.	<b>1 St.</b>
2a	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20“ Edelstahl (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20“ x 1“ feinprofil	1 St.
4c	05 120 45	Laufdecke 20“ x 1“ SENTINEL (schwarze Decke)	1 St.
4d	05 120 51	Bereifung 20“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4e	05 120 52	Bereifung 20“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4f	05 120 53	Bereifung 20“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

### Sonder-Greifringe:

2 - 3	30 633 65	Greifring 20“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.

**Design-Antriebsrad 24" (gerade gespeicht / Alu-Nabe silber)**

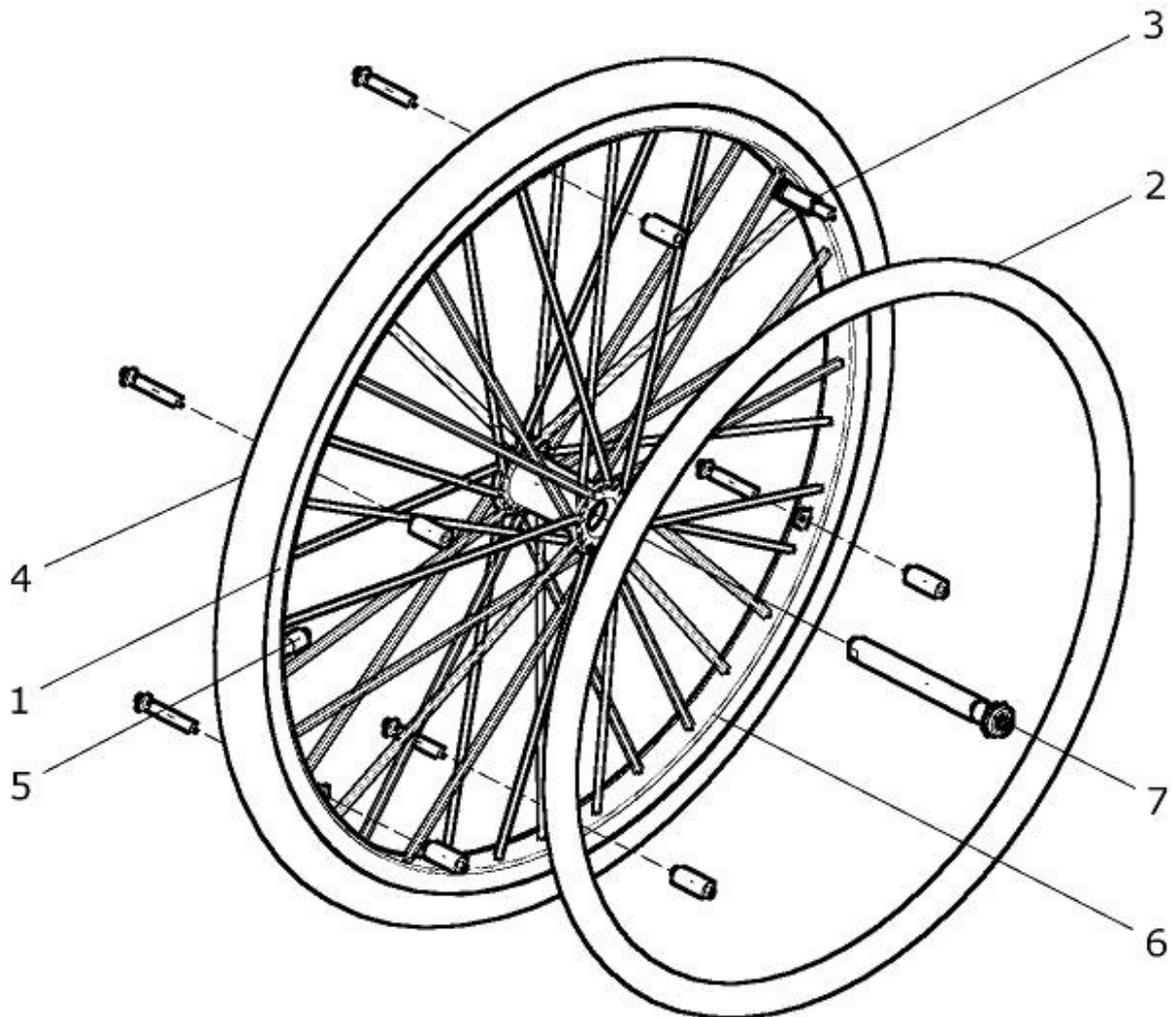

## Design-Antriebsrad 24 Zoll (Alu-Nabe silber)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	45 620 81	<b>Antriebsrad Design 24“x1 Edelstahl / Luft. feinprofil</b> kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 82	<b>Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Luft. feinprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 88	<b>Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. grau</b> kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 89	<b>Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. schwarz</b> kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	45 626 00	Speichenrad Design 24“ (gerade gespeicht und Nabe 1/2“ silber) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng</b> kpl.	1 St.
2a – 3b	50 623 85	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit</b> kpl.	1 St.
2b – 3a	50 623 00	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng</b> kpl.	1 St.
2b – 3b	50 623 30	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit</b> kpl.	1 St.
2c – 3a	50 623 50	<b>Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng</b> kpl.	1 St.
2a – 3c	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau super eng</b> kpl.	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber eloxiert	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 58	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.

**FILOU**

4d	05 124 48	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24" x 1" DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24" x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24" x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24" x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
7	45 626 21	Steckachse Ø12,7mm (½") L=99 mm Kappe silber / Logo schwarz	1 St.

**Sonder-Greifringe:**

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 - 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.



**Antriebsrad SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)**



## Antriebsrad SAFETY-GRIP 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 622 80	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 622 81	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. grobprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 622 82	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. feinprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 622 83	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 24“x1 pannensicher grau kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 24“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

## Antriebsrad SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 622 80	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 81	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 82	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 83	<b>Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 pannensicher grau kpl.</b> Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.



**Antriebsrad TENSIO (mit 18 FIBRE Speichen)**



## Antriebsrad TENSIO 24 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	45 614 81	<b>Antriebsrad TENSIO 24“x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 2	45 614 41	<b>Antriebsrad TENSIO 24“ mit Alu-Greifring schwarz</b> (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 614 91	Speichenrad TENSIO 24“ schwarz (mit Nabe 1/2“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 614 11	Greifring TENSIO 24“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

## Antriebsrad TENSIO 22 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	45 612 81	<b>Antriebsrad TENSIO 22“x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil</b> kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 2	45 612 41	<b>Antriebsrad TENSIO 22“ mit Alu-Greifring schwarz</b> (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 612 91	Speichenrad TENSIO 22“ schwarz (mit Nabe 1/2“) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 612 11	Greifring TENSIO 22“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
3b	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

## Antriebsrad LWW (Lightweightwheels)



## Antriebsrad LWW 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	40 614 81	<b>Antriebsrad LWW 24"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	40 614 85	<b>Antriebsrad LWW 24"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 614 89	Speichenrad LWW 24" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	40 613 10	Greifring LWW 24" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	40 613 15	Greifring LWW 24" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	40 613 84	Greifring CURVE L 24" / Lasche für LWW 24" Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.


## Antriebsrad LWW 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	22 614 81	<b>Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	22 614 85	<b>Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 614 89	Speichenrad LWW 22" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	22 613 10	Greifring LWW 22" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	22 613 15	Greifring LWW 22" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	22 613 84	Greifring CURVE 22" / Lasche für LWW 22" Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 21" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 121 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.

## Antriebsrad LWW 20 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	25 614 81	<b>Antriebsrad LWW 20"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 20"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	25 614 85	<b>Antriebsrad LWW 20"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl.</b> mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 20"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	25 614 89	Speichenrad LWW 20" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	25 613 10	Greifring LWW 20" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	25 613 15	Greifring LWW 20" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
3a	05 120 42	Laufdecke 20" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 121 45	Laufdecke 20" x 1" PRIO SENTINEL (schwarze Decke)	1 St.
4	05 120 22	Schlauch 20" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.

**Lochplatte FINDUS für Trommelbremse (außen montiert) 0° / 4° / 7° / 10°-Sturz für FILOU Rahmen H2**

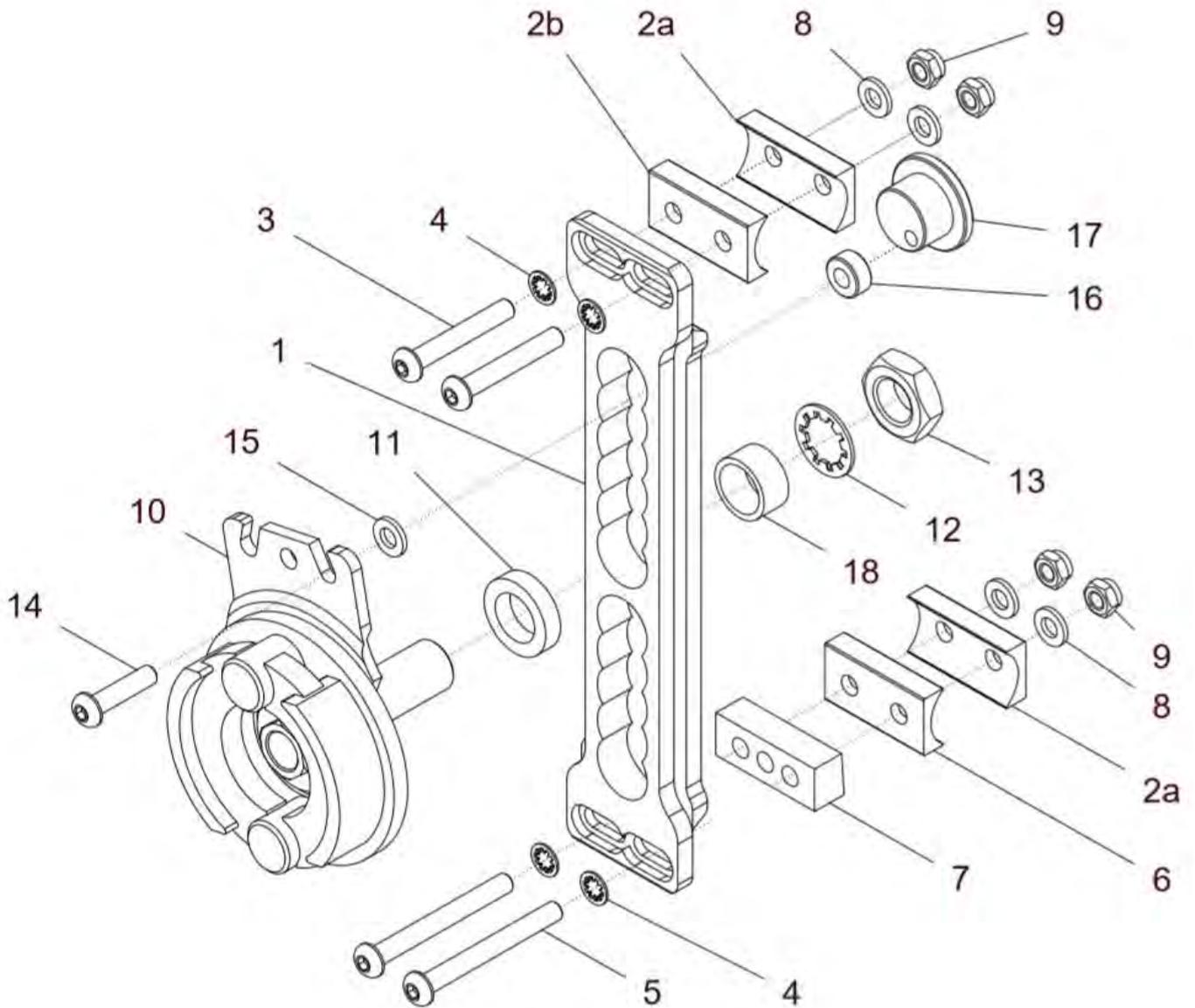

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	28 661 10	<b>Lochplatte für Trommelbremse außen montiert FILOU</b> kpl. (ohne Bremsträger) Sturz: ?	2 St.
1	25 621 11	Lochplatte FINDUS / FILOU H2	2 St.
2a – 5a, 8 – 9	28 661 90	<b>Montageset Sturz 0° für Lochplatte für Tr.br. FILOU</b> kpl. (ohne Lochplatte)	2 St.
2a – 5b, 6, 7a, 8 – 9	28 661 94	<b>Montageset Sturz 4° für Lochplatte für Tr.br. FILOU</b> kpl. (ohne Lochplatte)	2 St.
2a – 5c, 6, 7b, 8 – 9	28 661 97	<b>Montageset Sturz 7° für Lochplatte für Tr.br. FILOU</b> kpl. (ohne Lochplatte)	2 St.
2b – 5d, 6, 7c, 8 – 9	28 661 99	<b>Montageset Sturz 10° für Lochplatte für Tr.br. FILOU</b> kpl. (ohne Lochplatte)	2 St.
2a	50 621 02	Halbschale 6,5 Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
2b	50 621 02	Halbschale 6,5 Sturz 10°	6 St.
3	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	4 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
5a	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz Sturz 0°	4 St.
5b	01 153 29	Linsenkopfschraube M6x55 - ISO 7380 vz Sturz 4°	4 St.
5c	01 153 31	Linsenkopfschraube M6x65 - ISO 7380 vz Sturz 7°	4 St.
5d	01 152 34	Linsenkopfschraube M6x80 - ISO 7380 A2 Sturz 10°	4 St.
6	50 621 02	Halbschale 6,5 (nicht bei 0° Sturz)	2 St.
zu 7	-----	ohne Distanz Sturz 0°	-
7a	50 621 06	Distanzblock 12mm Sturz 4°	2 St.
7b	50 621 07	Distanzblock 22mm Sturz 7°	2 St.
7c	50 621 08	Distanzblock 33mm Sturz 10°	2 St.
8	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
9	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A4	8 St.
10a – 18	25 662 10	<b>Bremsträger rechts mit Befestigung an Lochplatte FINDUS</b> kpl. (ohne Lochplatte; für Lochplatte außen montiert) Sturz: ?	1 St.
10b – 18	25 663 10	<b>Bremsträger links mit Befestigung an Lochplatte FINDUS</b> kpl. (ohne Lochplatte; für Lochplatte außen montiert) Sturz: ?	1 St.
10a	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)	1 St.
10b	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)	1 St.
11a	50 661 17	Distanzscheibe 6mm (bei 0° / 4° Sturz)	2 St.


**FILOU**

11b	50 661 12	Distanzscheibe 18mm	(bei 7° Sturz)	2 St.
11c	50 622 22	Distanzscheibe 20mm	(bei 10° Sturz)	4 St.
12	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16		2 St.
13	01 212 06	Mutter M16x1 SW24		2 St.
14a	01 153 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 vz	(bei 0° / 4° Sturz)	2 St.
14b	01 153 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380 vz	(bei 7° Sturz)	2 St.
14c	01 153 26	Linsenkopfschraube M6x40 - ISO 7380 vz	(bei 10° Sturz)	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		2 St.
16a	25 225 13	Distanzröllchen 6mm	(bei 0° / 4° Sturz)	2 St.
16b	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	(bei 7° Sturz)	2 St.
16c	50 661 11	Distanzröllchen 22mm	(bei 10° Sturz)	2 St.
17	25 630 02	Befestigungsbolzen		2 St.
18	25 661 22	Buchse für Trommelbremse Ø20 x Ø 16 x L=10		2 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
2 – 5a, 8 – 9, 11a, 14a 15, 16a, 17, 18	25 661 90	Montageset Lochplatte Trommelbremse Sturz 0° (ohne Lochplatte FINDUS / ohne Bremsträger)	1 Set
2 – 5b, 6, 7b, 8 – 9, 11a, 14a 15, 16a, 17, 18	25 661 94	Montageset Lochplatte Trommelbremse Sturz 4° (ohne Lochplatte FINDUS / ohne Bremsträger)	1 Set
2 – 5c, 6, 7c, 8 – 9, 11b, 14b 15, 16b 17, 18	25 661 97	Montageset Lochplatte Trommelbremse Sturz 7° (ohne Lochplatte FINDUS / ohne Bremsträger)	1 Set
2 – 5d, 6, 7c, 8 – 9, 11c, 14c 15, 16c 17, 18	25 661 99	Montageset Lochplatte Trommelbremse Sturz 10° (ohne Lochplatte FINDUS / ohne Bremsträger)	1 Set



## Antriebsrad Trommelbremse

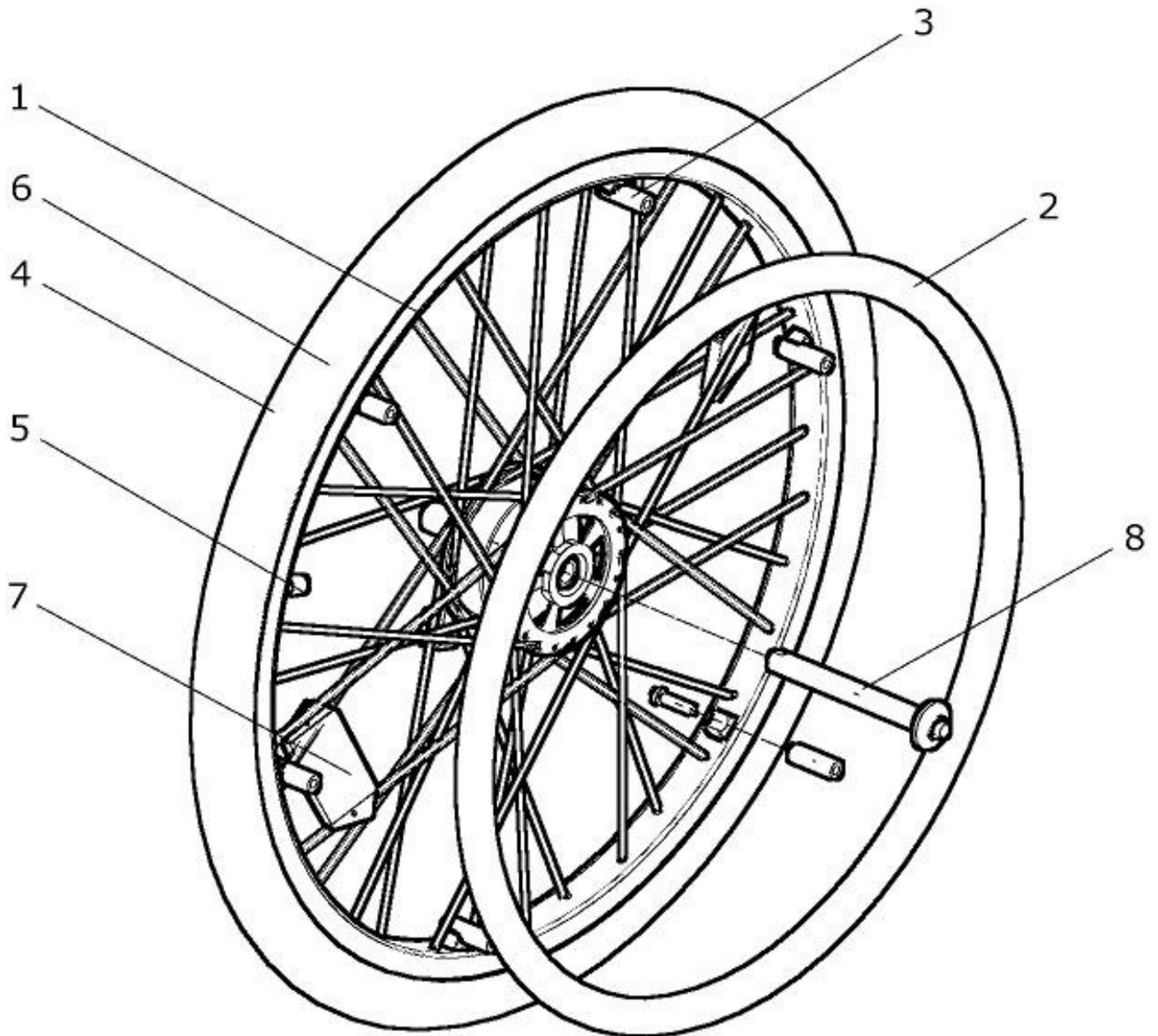

## Antriebsrad Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 81	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 82	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 87	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 86	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85S	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher schwarz kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 83	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 84	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 88	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	50 661 50	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4e – 7	50 661 58	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Luftbereifung Marathon Plus Evolution</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4h – 7	50 661 51	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Pannensicher grau</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g – 7	50 661 52	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Pannensicher grau</b> (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 24“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2a – 3b	50 623 85	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2b – 3a	50 623 00	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2b – 3b	50 623 30	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2c – 3a	50 623 50	<b>Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 58	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

### Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 - 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 81	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 82	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 85	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 83	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 87	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 84	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 86	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	10 661 50	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b – 7	10 661 51	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Luftbereifung grobprofil</b> (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	10 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	<b>Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2a – 3b	10 613 85	<b>Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2b – 3a	10 613 00	<b>Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.

<b>2b – 3b</b>	<b>10 613 30</b>	<b>Greifring 22“ Edelstahl / Anbau weit kpl.</b>	<b>1 St.</b>
<b>2c – 3a</b>	<b>10 613 50</b>	<b>Greifring 22“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.</b>	<b>1 St.</b>
2a	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 58	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

**Sonder-Greifringe:**

2 - 3	10 613 35	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22“ CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22“ CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22“ TETRA-GRIP	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse 20 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 72	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 71	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 74	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 73	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a, 3a	10 661 79	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau eng</b> (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: eng	1 St.
1, 2a, 3b	10 661 78	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau weit</b> (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: weit	1 St.
1	10 661 65	Speichenrad Trommelbremsnabe 20“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	30 633 15	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	30 633 30	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2a	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20“ Edelstahl (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20“ x 1“ feinprofil	1 St.
4c	05 120 51	Bereifung 20“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.


**FILOU**

4d	05 120 52	Bereifung 20" x 1 pannensicher grau	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

**Sonder-Greifringe:**

2 - 3	30 633 65	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse „Black-Edition“

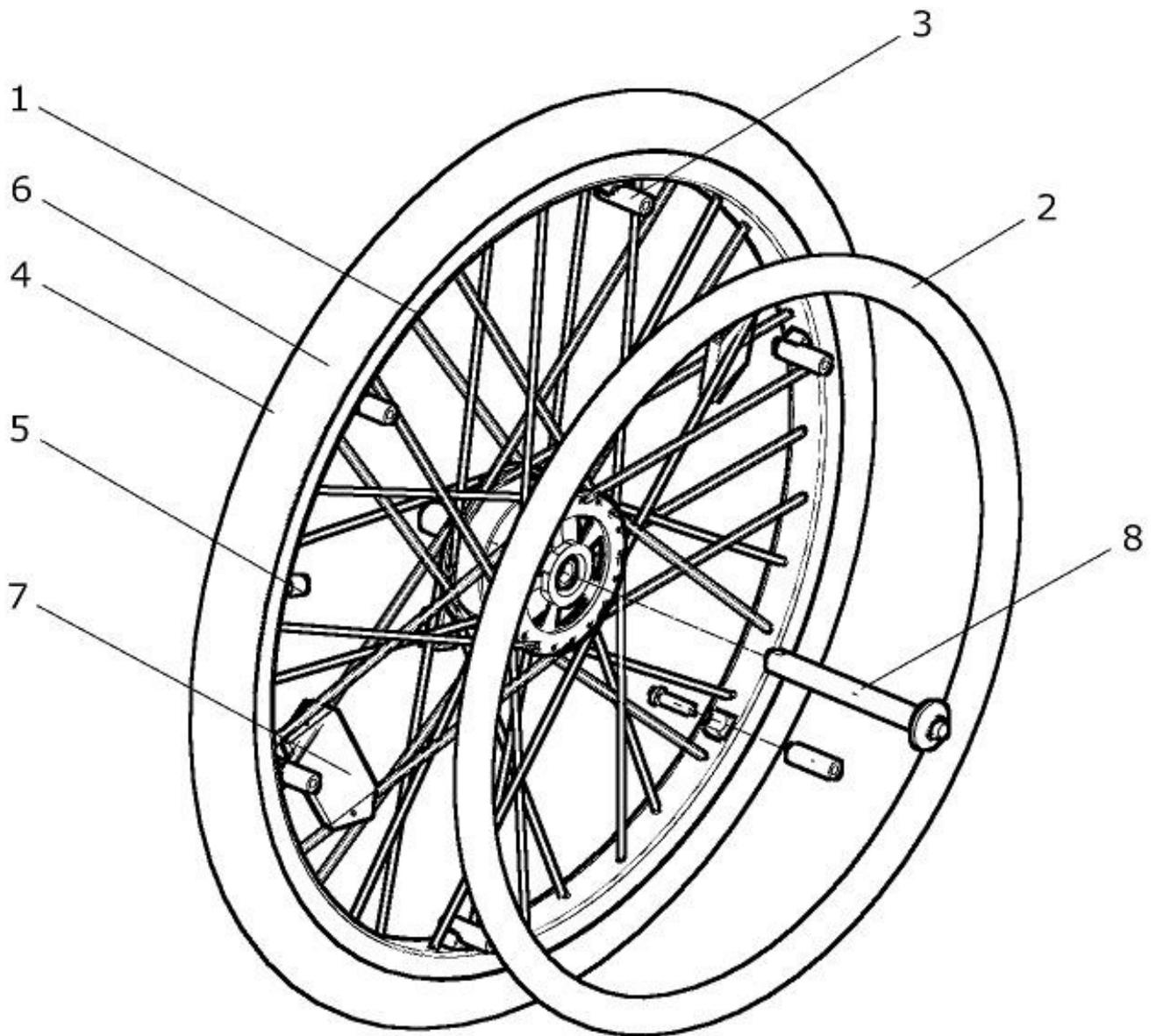

## Antriebsrad Trommelbremse 24“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 666 81	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung <b>SENTINEL</b> Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 666 82	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / MarathonPlusEvolution kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung <b>Marathon Plus Evolution</b> Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 666 83	<b>Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und <b>pannensicherer Bereifung 24“x1 schwarz</b> (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	50 666 59	Speichenrad Trommelbremsnabe 24“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	50 623 55	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2 – 3b	50 623 85	<b>Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 58	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 124 45	Laufdecke 24“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarze Decke)	1 St.
4b	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4c	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse 22“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 666 81	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung <b>SENTINEL</b> Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 82	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / MarathonPlusEvolution kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung <b>Marathon Plus Evolution</b> Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 83	<b>Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und <b>pannensicherer Bereifung 22“x1 schwarz</b> (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	10 666 59	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	10 613 55	<b>Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
2 – 3b	10 613 85	<b>Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.</b>	1 St.
2	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 58	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 122 45	Laufdecke 22“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarz Decke)	1 St.
4b	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4c	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse 20“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 666 41	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung <b>SENTINEL</b> Luftbereifung 20“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 42	<b>Antriebsrad Tr.br. 20“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und <b>pannensicherer Bereifung 20“x1 schwarz</b> (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	10 666 29	Speichenrad Trommelbremsnabe 20“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 45	Laufdecke 20“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarze Decke)	1 St.
4b	05 120 53	Bereifung 20“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 120 22	Schlauch 20“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

**Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)**



## Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 662 80	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 3/8 Luft. grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 81	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 82	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. feinprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 83	<b>Antriebsrad Tr.Br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 pannen. grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

## Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 662 80	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grob kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 81	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 82	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 83	<b>Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 pannen. grau kpl.</b> Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.




## Speichenschutz

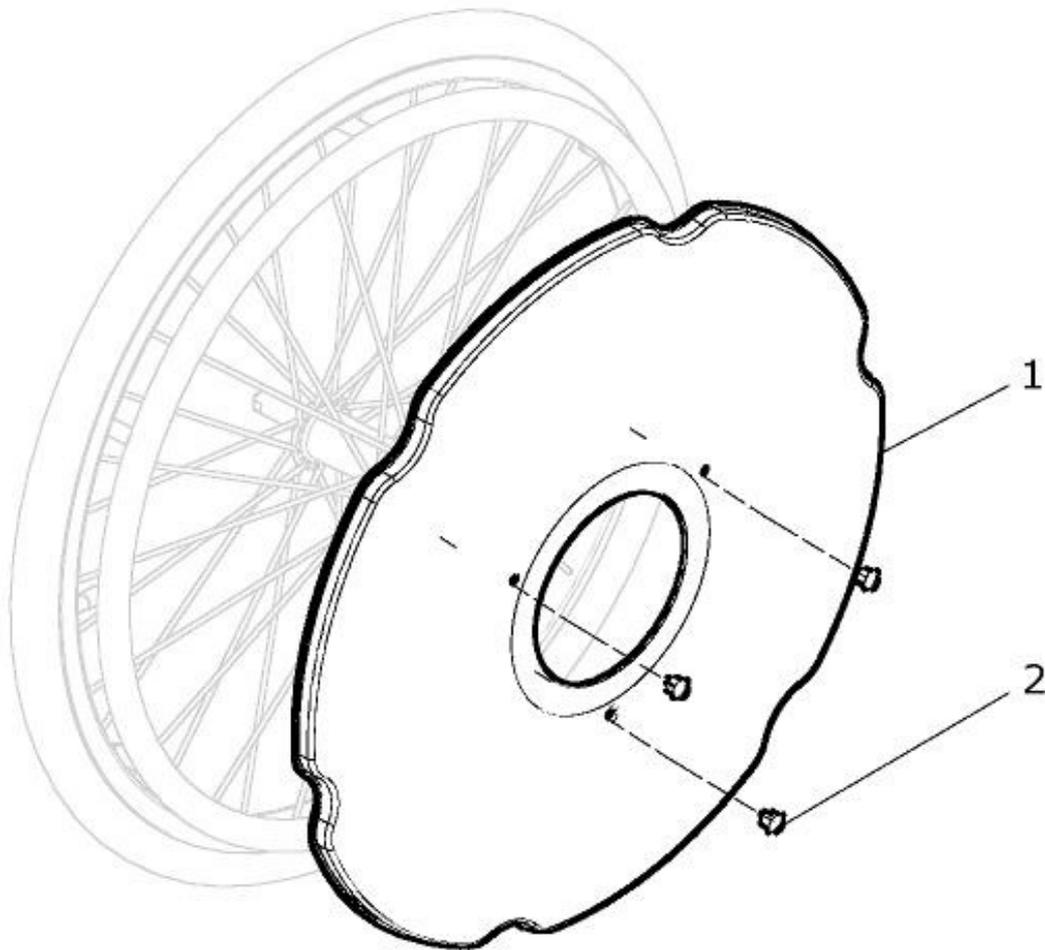


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	10 624 00	Speichenschutz 20" transparent kpl.	1 St.
1	10 624 01	Speichenschutz 20" transparent	1 St.
o. Bild	04 250 03	Aufkleber BeRollKa	2 St.
2	50 624 91	Clip für Speichenschutzbefestigung	3 St.
1 – 2	10 614 00	Speichenschutz 22" transparent kpl.	1 St.
1	10 614 00	Speichenschutz 22" transparent	1 St.
1 – 2	50 624 00	Speichenschutz 24" transparent kpl.	1 St.
1	50 624 01	Speichenschutz 24" transparent	1 St.

## Greifringüberzug

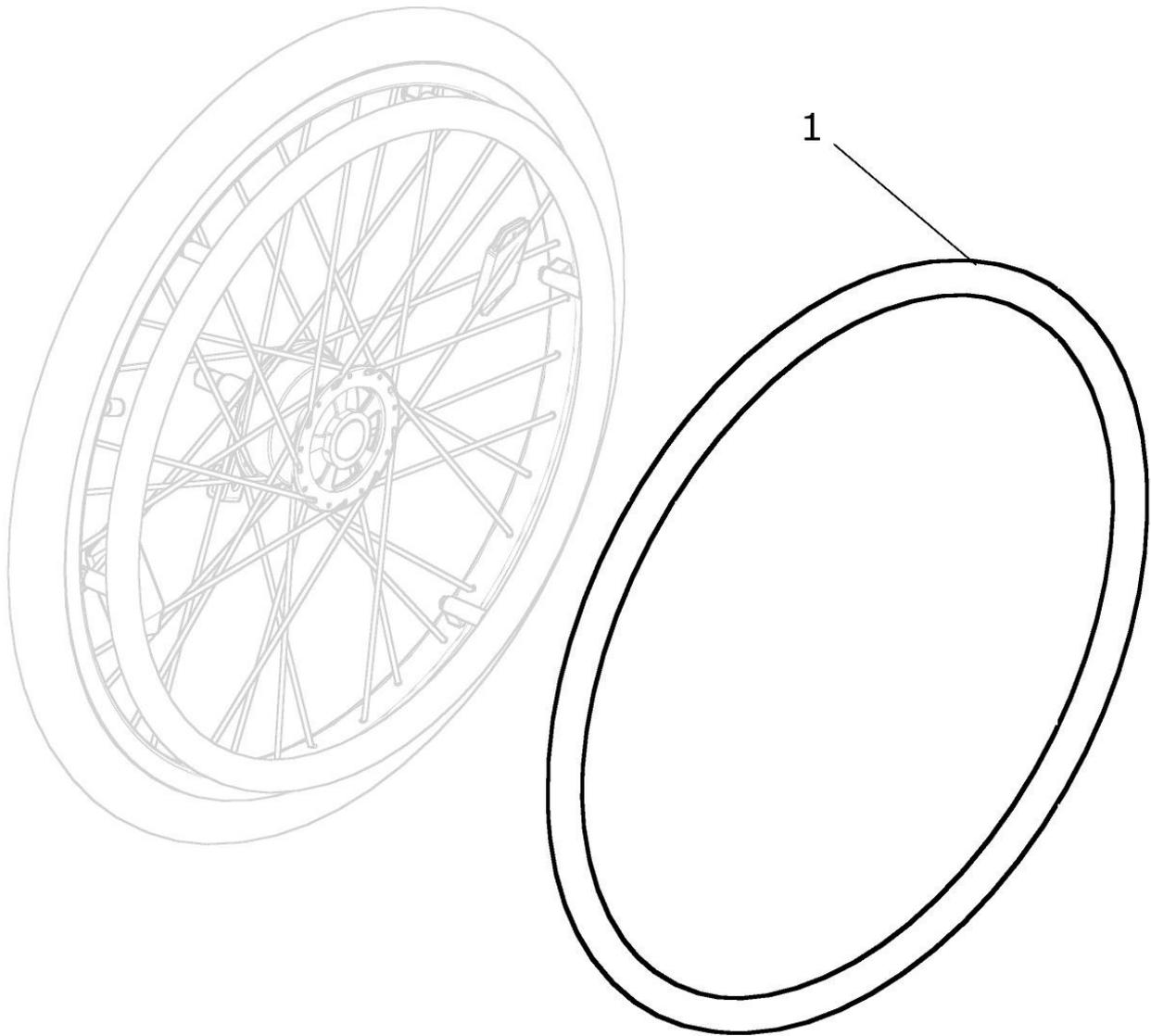


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	05 120 11	Greifringüberzug 20" glatt schwarz	1 St.
1	05 122 11	Greifringüberzug 22" glatt schwarz	1 St.
1	05 124 11	Greifringüberzug 24" glatt schwarz	1 St.

**Radstandsverlängerung FINDUS bei 3° - 10° Sturz  
für FILOU Rahmen H2**

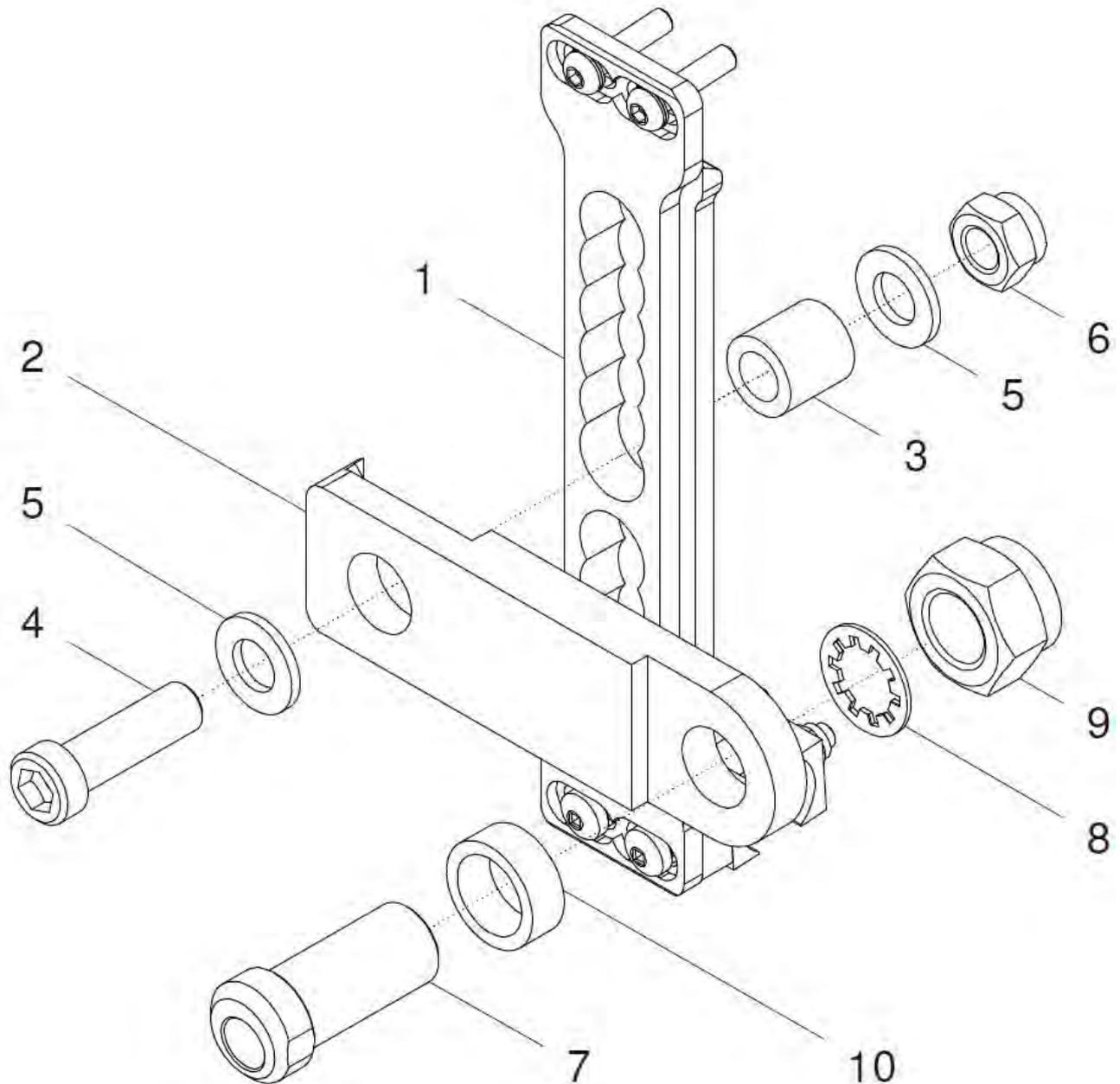


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1 – 6</b>	<b>25 625 50</b>	<b>Radstandsverlängerung FINDUS mit Lochplatte FINDUS kpl.</b> Radstandsverlängerung mit Lochplatte und mit Montageset (ohne Einschraubadapter ) Sturz: ? (für 3°, 5°, 7° oder 10°)	<b>2 St.</b>
1	25 621 10	Lochplatte FINDUS außen montiert 3°/5°/7°/10° kpl. Lochplatte FINDUS mit Halbschalen und Schrauben Sturz: ? (für 3°, 5°, 7° oder 10°)	2 St.
<b>2 - 6</b>	<b>25 625 00</b>	<b>Radstandsverlängerung FINDUS kpl.</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter)	<b>2 Set</b>
2	25 625 01	Radstandsverlängerung FINDUS (100mm nach hinten)	2 St.
3	25 625 02	Buchse FINDUS	2 St.
4	01 161 63	Zylinderkopfschraube M12x40 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125 vz	4 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985 vz	2 St.
<b>7a – 10a</b>	<b>25 621 20</b>	<b>Einschraubadapter kurz (mit 3° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> für Montage-Set 3°- und 5°-Sturz	<b>2 St.</b>
<b>7b – 10</b>	<b>25 621 40</b>	<b>Einschraubadapter lang (mit 2° Eigenschräge) FINDUS kpl.</b> für Montage-Set 7°- und 10°-Sturz Sturz: ?	<b>2 St.</b>
7a	25 621 24	Einschraubadapter kurz (3°) FINDUS	2 St.
7b	25 621 51	Einschraubadapter lang (2°) FINDUS	2 St.
8	01 330 08	Schnorr-Scheibe NM 20	2 St.
9	25 621 21	Mutter M20x1,5 (SW 24) A2	2 St.
10a	25 621 03	Buchse 10mm (20,2x10x27) Sturz 3°, 5°, 10°	2 St.
10b	25 621 02	Buchse 5mm (20,2x5x27) Sturz 7°	2 St.

**Radstandsverlängerung FINDUS bei 0° Sturz  
für FILOU Rahmen H2**

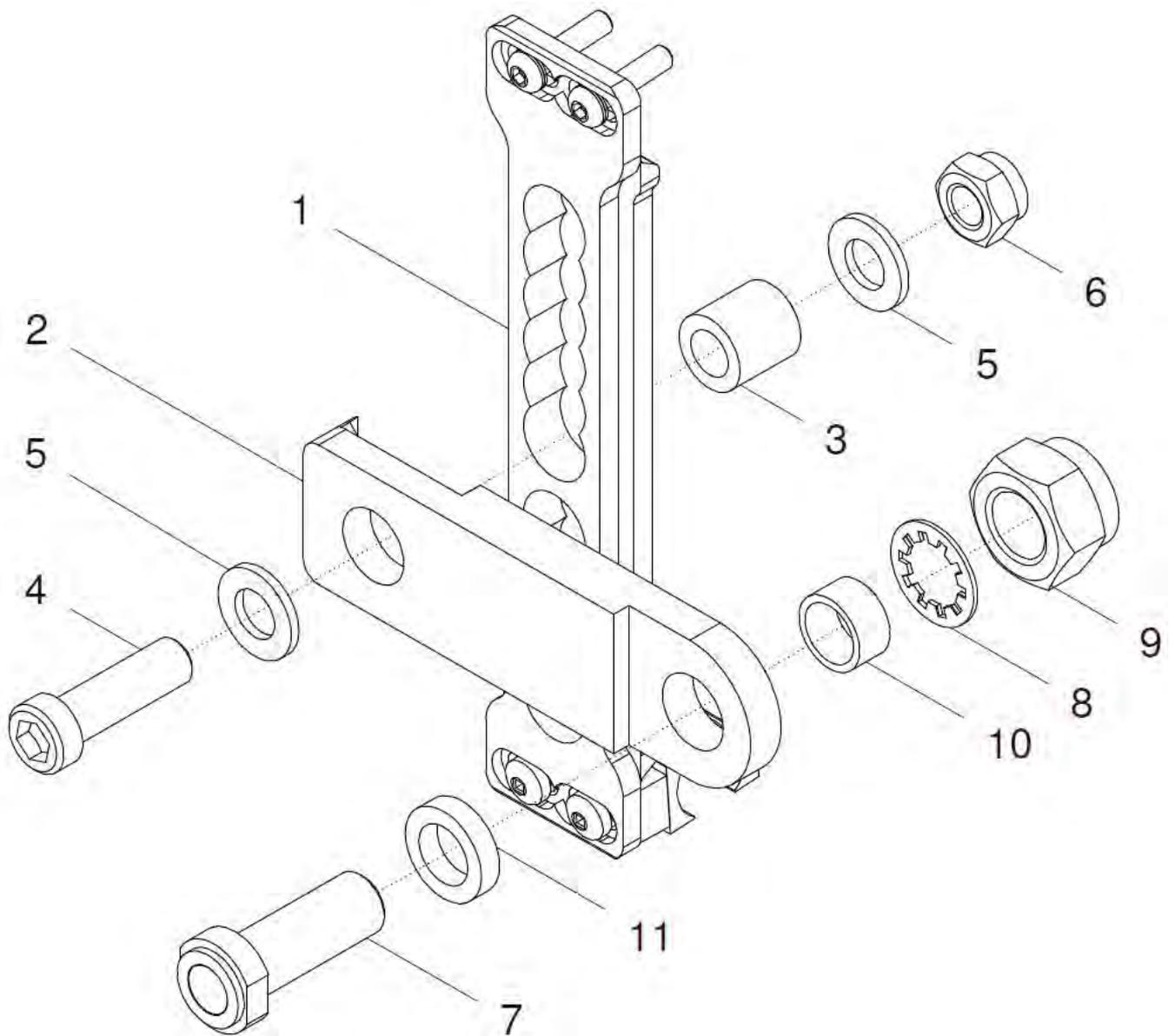

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	25 625 60	<b>Radstandsverlängerung FINDUS mit Lochplatte 0° FINDUS kpl.</b> Radstandsverlängerung mit Lochplatte und mit Montageset (ohne Einschraubadapter ) Sturz: 0°	2 St.
1	25 621 80	Lochplatte FINDUS außen montiert 0°-Sturz kpl. Lochplatte FINDUS mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 0°	2 St.
2 - 6	25 625 00	<b>Radstandsverlängerung FINDUS kpl.</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter)	2 Set
2	25 625 01	Radstandsverlängerung FINDUS (100mm nach hinten)	2 St.
3	25 625 02	Buchse FINDUS	2 St.
4	01 161 63	Zylinderkopfschraube M12x40 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125 vz	4 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985 vz	2 St.
7 - 11	25 621 85	<b>Einschraubadapter 0° FINDUS kpl.</b>	2 St.
7	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
8	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM 16 ZN	2 St.
9	01 212 05	Mutter M16x1 A2	2 St.
10	25 661 22	Buchse 10mm (Ø20xØ16x10) für Bohrung Radstandsverlängerung	2 St.
11	50 661 17	Buchse 6mm (Ø25xØ16x6)	2 St.


**Radstandsverlängerung für Trommelbremse bei 0°, 3°, 5°, 7°, 10° Sturz für FILOU Rahmen H2**

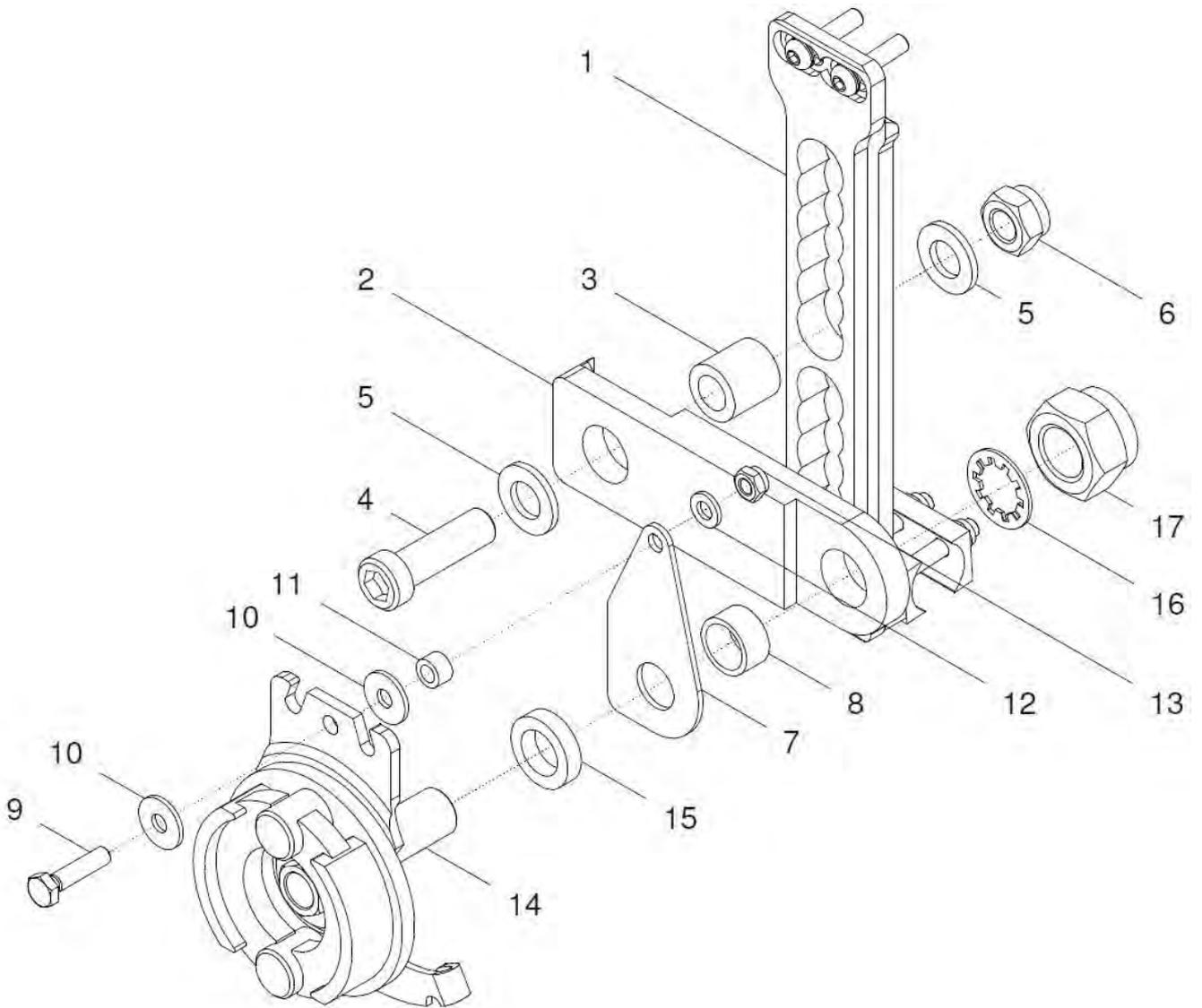

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 17	25 661 50	<b>Radstandsverlängerung FINDUS mit Lochplatte/Bremsträger kpl. Lochplatte FINDUS mit Radstandsverlängerung und mit Gegenhalter und Befestigung</b> Sturz: ? (für 0°, 3°, 5°, 7° oder 10°)	1 Paar
1	25 661 10	Lochplatte für Trommelbremse FINDUS außen montiert 0°-10° kpl. Lochplatte FINDUS mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben Sturz: ? (für 0°, 3°, 5°, 7° oder 10°)	2 St.
2 - 13	25 661 20	<b>Radstandsverlängerung Trommelbremse FINDUS kpl. Radstandsverlängerung mit Gegenhalter und Befestigung</b> (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger)	2 Set
2 - 6	25 625 00	<b>Radstandsverlängerung FINDUS kpl.</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter)	2 Set
2	25 625 01	Radstandsverlängerung FINDUS (100mm nach hinten)	2 St.
3	25 625 02	Buchse FINDUS	2 St.
4	01 161 63	Zylinderkopfschraube M12x40 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125 vz	4 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985 vz	2 St.
7	50 661 21	Gegenhalter	2 St.
8	25 661 22	Buchse 10mm (Ø20xØ16x10) für Bohrung Radstandsverlängerung	2 St.
9	01 111 03	Sechskantschraube M6x25 - DIN 933	2 St.
10	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
11	50 661 14	Distanzröllchen 6mm	2 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
13	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A4	2 St.
14a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A rechts montiert (Hebel zeigt nach rechts) Wird bei Radstandsverlängerung auf die rechte Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.	1 St.
14b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B links montiert (Hebel zeigt nach links) Wird bei Radstandsverlängerung auf die linke Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt	1 St.
15	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
16	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
17	01 212 06	Mutter M16x1 SW 24	2 St.

**Einhandantrieb für FILOU Rahmen H2**

(für Rahmenhöhe H1 nicht möglich)

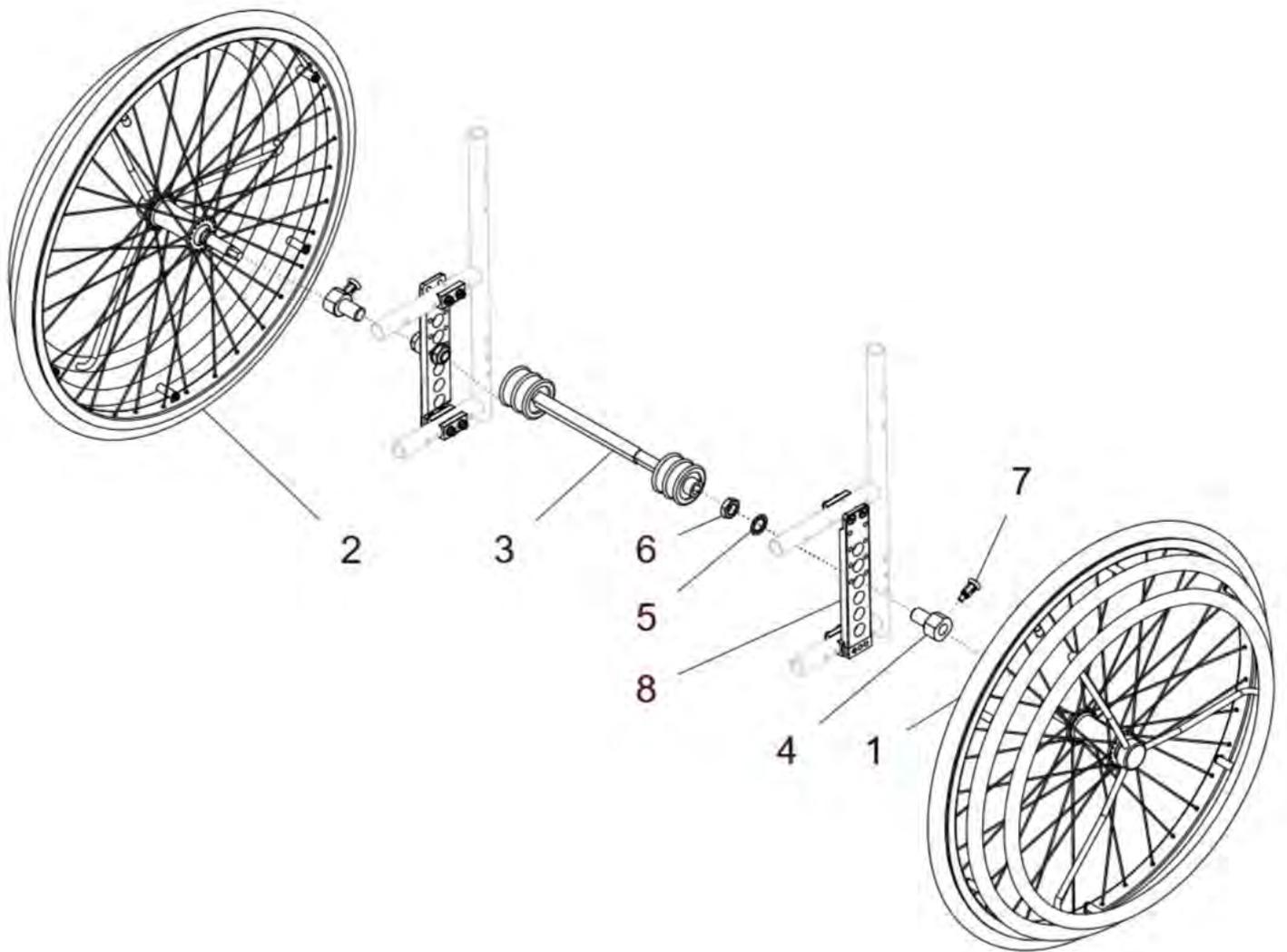

## Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	50 670 00	<b>Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring kpl</b> <b>Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b - 7	25 670 00	<b>Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring eng kpl</b> <b>Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	50 672 00	<b>Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 672 00	<b>Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng mit Doppelgreifring eng aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 672 50	<b>angetriebene Rad 24“ ohne Greifring</b> (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 06	Verbindungsstück mit Kardangelen 19,5 - 23,5cm (SB 28 - 30cm)	1 St.
3b	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelen 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3c	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelen 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3d	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelen 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3e	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelen 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3f	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelen 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	50 671 10	<b>Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.</b> <b>mit Rastbolzen</b>	2 St.
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

8a	50 671 00	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
8b	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
9 o. Bild	50 623 00	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
9.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

**Hinweis zu Position 3:**

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

## Umbausatz Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 670 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	25 670 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

## Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	10 670 00	<b>Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl</b> <b>Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b - 7	22 670 00	<b>Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl</b> <b>Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 672 00	<b>Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 672 00	<b>Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 672 50	<b>angetriebene Rad 22“ ohne Greifring</b> (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 06	Verbindungsstück mit Kardangelenken 19,5 - 23,5cm (SB 28 - 30cm)	1 St.
3b	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenken 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3c	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenken 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3d	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenken 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3e	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenken 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3f	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenken 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	50 671 10	<b>Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.</b> <b>mit Rastbolzen</b>	2 St.
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

8a	50 671 00	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
8b	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
9 o. Bild	10 613 00	<b>Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
9.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

**Hinweis zu Position 3:**

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.


## Umbausatz Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 670 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	22 670 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz



**Lochplatte für Einhandantrieb (außen montiert)**

**0°, 2°, 4°, 7°Sturz**

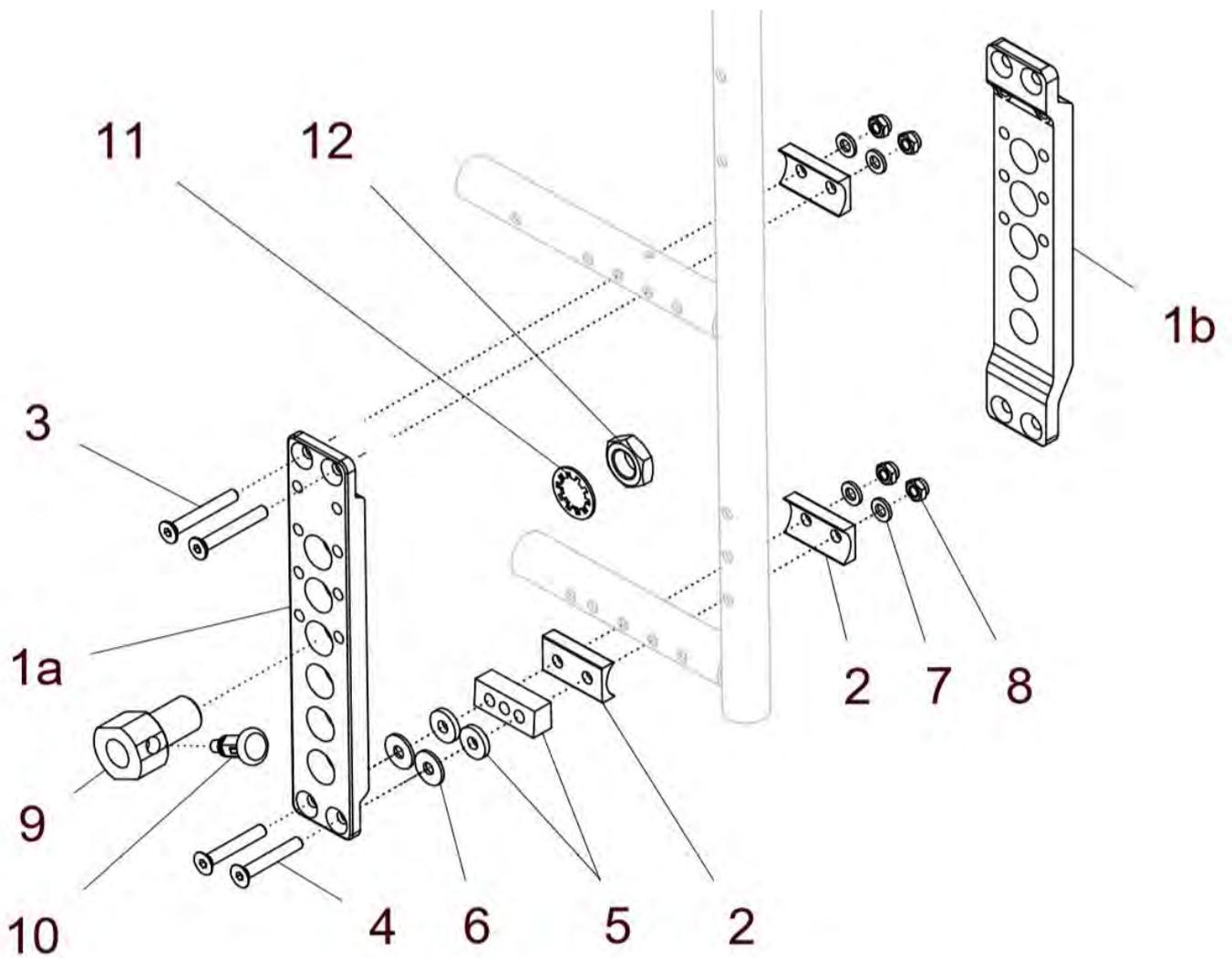

**Lochplatte gerade:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
<b>1a – 8</b>	<b>50 671 00</b>	<b>Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl.</b> Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		<b>2 St.</b>
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
<b>2 – 4a, 7 – 8</b>	<b>50 621 90</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 0°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4b, 5a – 8</b>	<b>50 621 92</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 2°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4c, 5b, 7, 8</b>	<b>50 621 94</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 4°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4d, 5c, 7, 8</b>	<b>50 621 97</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 7°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
<b>9 – 12</b>	<b>50 671 10</b>	<b>Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl.</b> mit Rastbolzen		<b>2 St.</b>
9	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb		2 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 18 zn		2 St.
12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter EHA		2 St.

**Lochplatte tief:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
<b>1b – 8</b>	<b>50 671 05</b>	<b>Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl.</b> Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		<b>2 St.</b>
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
<b>2 – 4a, 7 – 8</b>	<b>50 621 90</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 0°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4b, 5a – 8</b>	<b>50 621 92</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 2°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4c, 5b, 7, 8</b>	<b>50 621 94</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 4°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4d, 5c, 7, 8</b>	<b>50 621 97</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 7°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.



**Einhandantrieb mit Trommelbremse für FILOU Rahmen H2**  
(für Rahmenhöhe H1 nicht möglich)

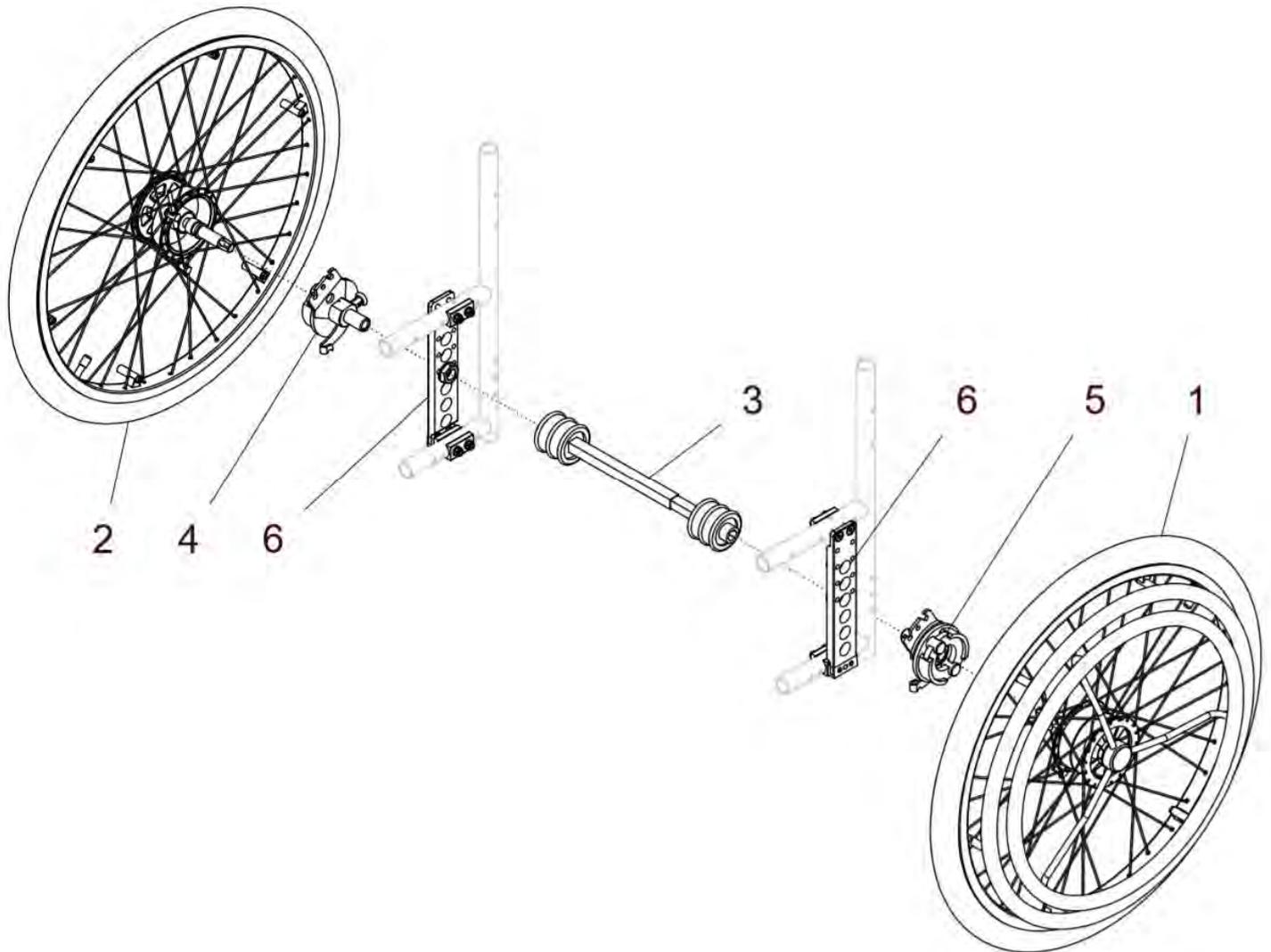

## Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	50 675 00	<b>Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring kpl.</b> <b>Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl</b> <b>und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit</b> <b>Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b – 5	25 675 00	<b>Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring eng kpl.</b> <b>Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl</b> <b>und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit</b> <b>Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	50 677 00	<b>Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring</b> <b>mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 677 00	<b>Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring eng</b> <b>mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 677 50	<b>angetriebene Rad Trommelbremse 24“ ohne Greifring</b> (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 06	Verbindungsstück mit Kardangelen 19,5 - 23,5cm (SB 28 - 30cm)	1 St.
3b	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelen 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3c	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelen 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3d	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelen 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3e	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelen 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3f	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelen 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	50 671 00	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl.</b> <b>mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6b	50 671 50	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl.</b> <b>mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
6c	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl.</b> <b>Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6d	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl.</b> <b>Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
7 o. Bild	50 623 00	<b>Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
7.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

**Hinweis zu Position 3:**

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

## Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 675 80	<p><b>Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b></p> <p>SB: ?                      Bereifung: ?                      Lochplatte: gerade / tief ?                      Montage Lochplatte: außen / innen ?                      (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)</p>	1 Satz
	25 675 80	<p><b>Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b></p> <p>SB: ?                      Bereifung: ?                      Lochplatte: gerade / tief ?                      Montage Lochplatte: außen / innen ?                      (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)</p>	1 Satz

## Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	10 675 00	<b>Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring kpl.</b> <b>Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl</b> <b>und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit</b> <b>Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b – 5	22 675 00	<b>Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring eng kpl.</b> <b>Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl</b> <b>und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit</b> <b>Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff</b> (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 677 00	<b>Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring</b> <b>mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 677 00	<b>Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring eng</b> <b>mit Doppelgreifring aus Edelstahl</b> (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 677 50	<b>angetriebene Rad Trommelbremse 22“ ohne Greifring</b> (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 06	Verbindungsstück mit Kardangelen 19,5 - 23,5cm (SB 28 - 30cm)	1 St.
3b	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelen 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3c	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelen 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3d	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelen 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3e	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelen 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3f	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelen 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	50 671 00	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6b	50 671 50	<b>Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
6c	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6d	50 671 05	<b>Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben</b> Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
7 o. Bild	10 613 00	<b>Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.</b>	1 St.
7.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

**Hinweis zu Position 3:**

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet.

Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.


## Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 675 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	22 675 80	<b>Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör</b> SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz



**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse  
(außen montiert)**

**0° / 2° / 4° / 7° Sturz**

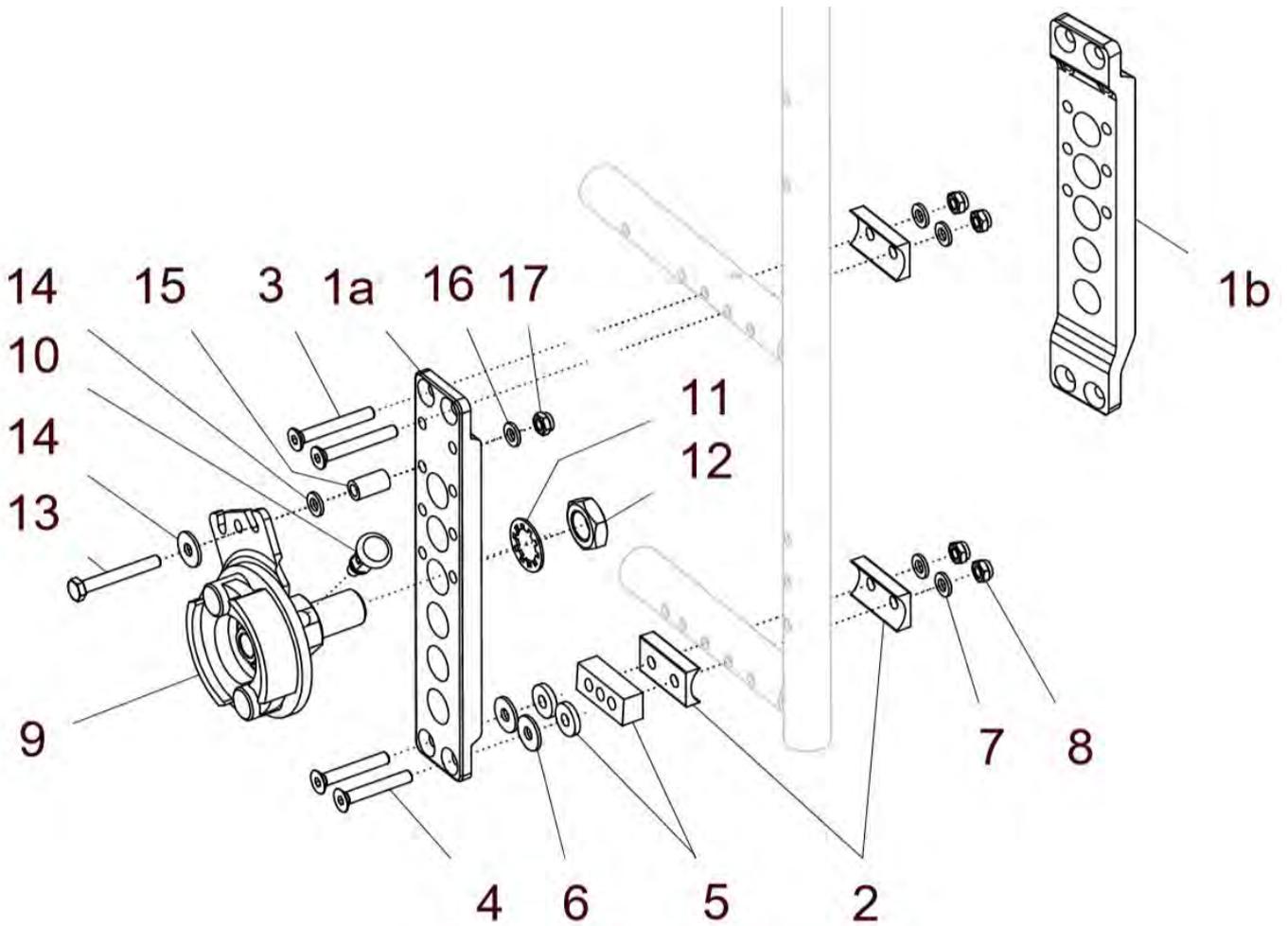

**Lochplatte gerade:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	50 671 00	<b>Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl.</b> Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 0°</b>	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 2°</b>	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 4°</b>	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 7°</b>	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
9a – 17	50 676 20	<b>Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl.</b> mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9b – 17	50 676 30	<b>Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl.</b> mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)		1 St.
9b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)		1 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn		2 St.

**FILOU**

12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
13	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 A2	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
15	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
17	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.


**Lochplatte tief:**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
<b>1b – 8</b>	<b>50 671 05</b>	<b>Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl.</b> Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		<b>2 St.</b>
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
<b>2 – 4a, 7 – 8</b>	<b>50 621 90</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 0°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4b, 5a – 8</b>	<b>50 621 92</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 2°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4c, 5b, 7, 8</b>	<b>50 621 94</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 4°</b>	<b>2 St.</b>
<b>2 – 4d, 5c, 7, 8</b>	<b>50 621 97</b>	<b>Montageset</b>	<b>Sturz 7°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe		--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe		4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.



**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse  
(innen montiert)**

0° / 2° Sturz

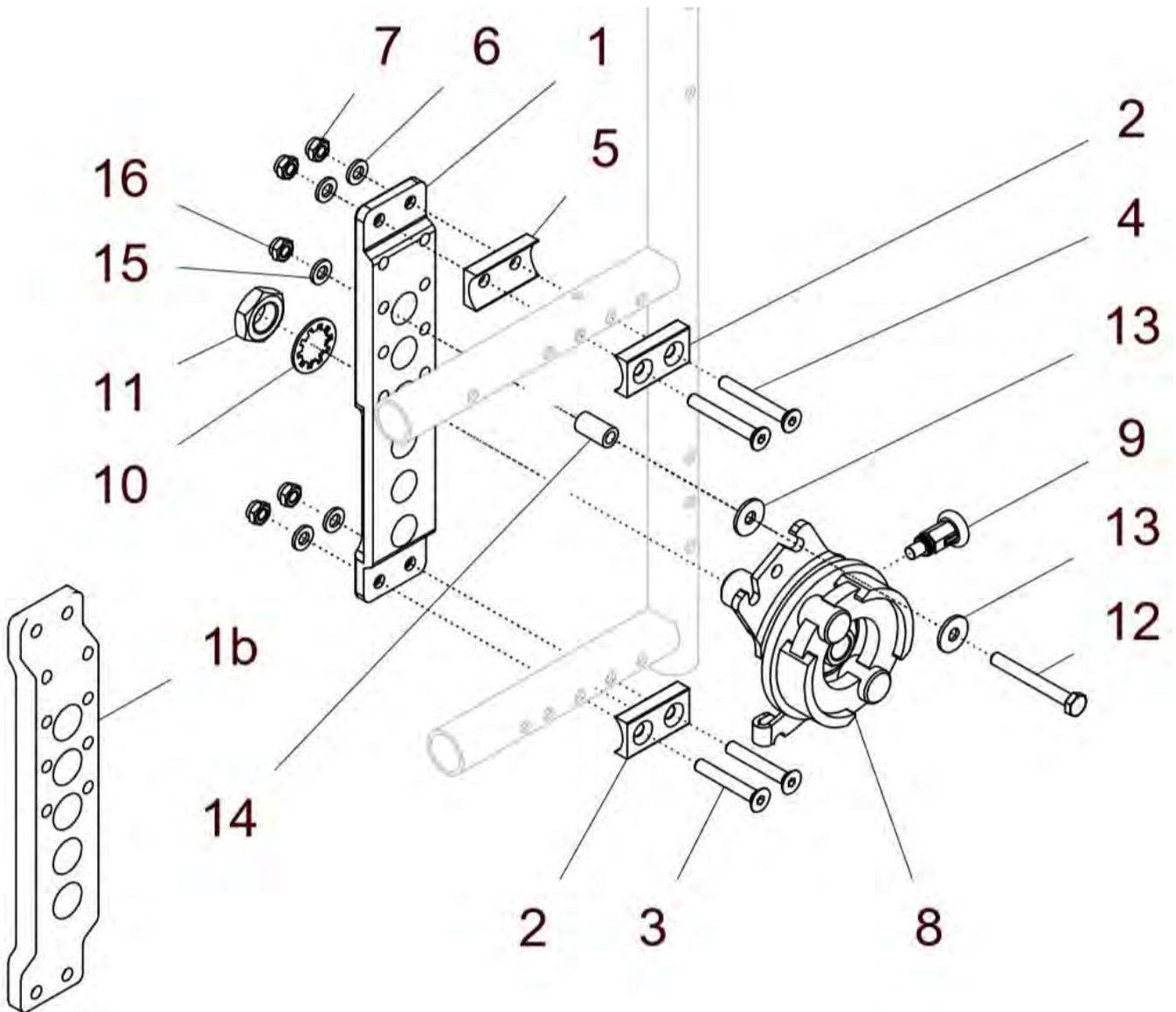

**Lochplatte gerade (innen montiert):**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1a – 7</b>	<b>50 671 50</b>	<b>Lochplatte gerade für EHA innen montiert kpl.</b> Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	<b>2 St.</b>
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
<b>2 – 7</b>	<b>22 621 90</b>	<b>Montageset LP innen Sturz 0° / 2°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>8a – 16</b>	<b>50 676 20</b>	<b>Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl.</b> mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	<b>1 St.</b>
<b>8b – 16</b>	<b>50 676 30</b>	<b>Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl.</b> mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	<b>1 St.</b>
8a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)	1 St.
8b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)	1 St.
9	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)	2 St.
10	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn	2 St.
11	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
12	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380 vz	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
14	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
16	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.


**Lochplatte tief (innen montiert):**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1a – 7</b>	<b>50 671 55</b>	<b>Lochplatte tief für EHA innen montiert kpl.</b> Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	<b>2 St.</b>
1a	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
<b>2 – 7</b>	<b>22 621 90</b>	<b>Montageset LP innen Sturz 0° / 2°</b>	<b>2 St.</b>
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.



**Lenkrad FILOU mit Schraubachse kurz**

**(schwarz eloxiert)**

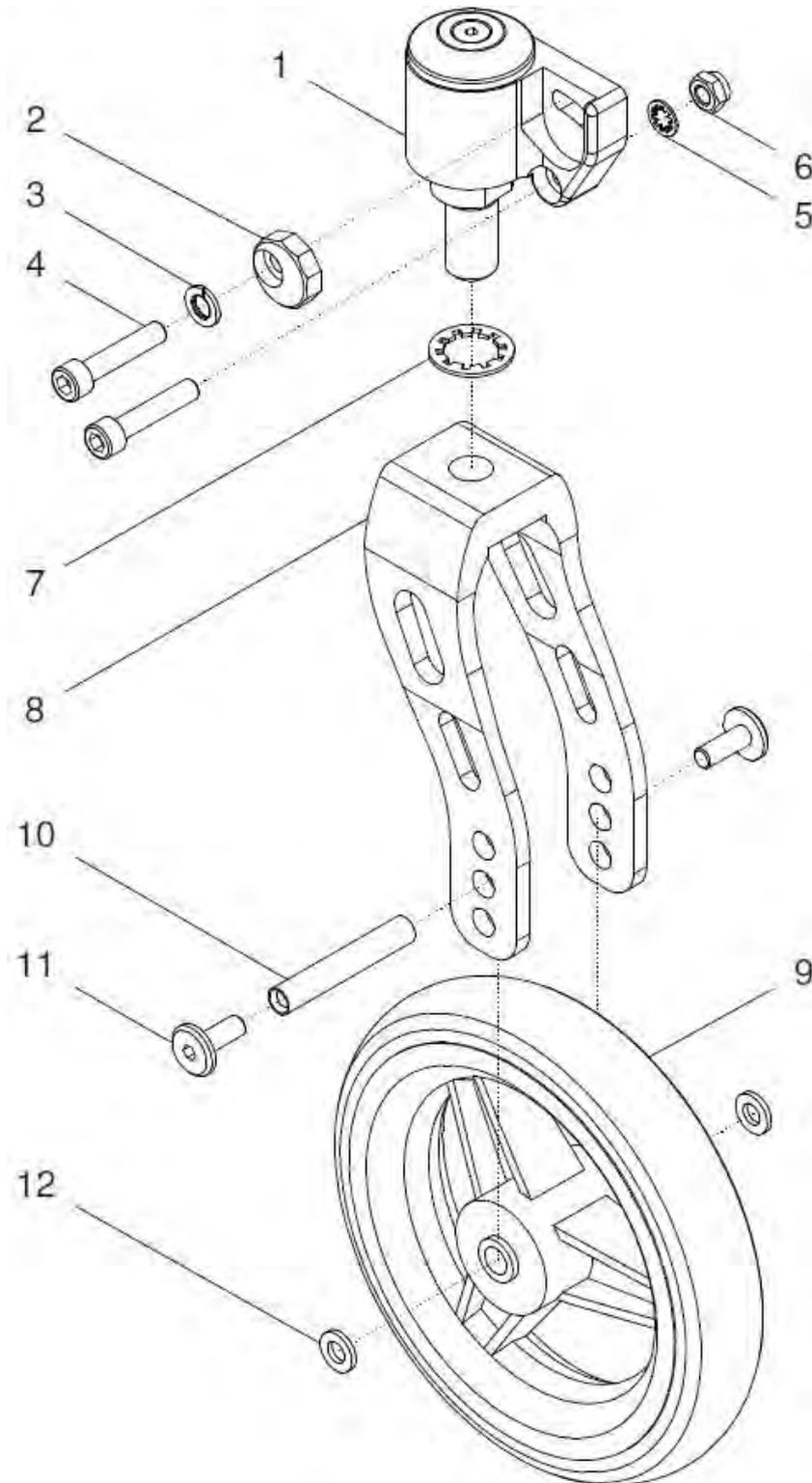

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	25 640 10	<b>Lenkradsatz 4“/ 5“/ 6“ Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (39x132) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? FM Lenkradgabel: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1 – 12	25 640 50	<b>Lenkradsatz 4“/ 5“/ 6“ Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (39x170) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? FM Lenkradgabel: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1 – 12	25 640 80	<b>Lenkradsatz 140mm Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (45x145) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? (140mm grau oder 140mm schwarz) FM Lenkradgabel: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1a - 7	25 642 25	<b>Lenkradadapter kurz rechts mit Exzentrerscheibe kpl.</b> Lenkradadapter kurz rechts mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel mit Exzentrerscheiben und mit Befestigung FM: schwarz eloxiert	1 St.
1b - 7	25 642 35	<b>Lenkradadapter kurz links mit Exzentrerscheibe kpl.</b> Lenkradadapter kurz links mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel mit Exzentrerscheiben und mit Befestigung FM: schwarz eloxiert	1 St.
1a	25 642 20V	Lenkradadapter kurz rechts kpl. Lenkradadapter rechts mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel FM: schwarz eloxiert	1 St.
1b	25 642 30V	Lenkradadapter kurz links kpl. Lenkradadapter links mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel FM: schwarz eloxiert	1 St.
2	25 642 12	Exzentrerscheibe für Lenkradadapter kurz	2 St.
3	01 334 03	Keilsicherungsscheibenpaar Nord-Lock 6,5	2 St.
4	01 160 75B	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912 vz	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
6	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
7	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM14	2 St.
8a	45 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“) FM: ?	2 St.
8b	45 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“) FM: ?	2 St.
8c	45 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, farbig (für Lenkrad 140mm) FM: ?	2 St.

**FILOU**

9a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi	2 St.
9b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi	2 St.
9c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi	2 St.
9d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift	2 St.
9e	05 201 11	Lenkrad 140mm Soft-Vollgummi	2 St.
10a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 170)	2 St.
10b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
11	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.
12a	01 320 03	Scheibe DIN 125 8,4 (bei Lenkrad 4" Vollgummi)	4 St.
12b	--	ohne Scheibe (bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi)	--
12c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5 für Lenkrad (bei Skater und LED 4" und 5")	4 St.
12d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad 4" und 5" Alu Soft)	4 St.
12e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	4 St.

**Sonderräder**

9f	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
9g	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
9h	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
9i	05 201 65	Lenkrad 4" Skater mit LED	2 St.
9j	05 201 55	Lenkrad 4" Skater	2 St.
9k	05 203 14	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
9l	05 203 64	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
9m	05 201 44	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
9n	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
9o	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
9p	05 203 15	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
9q	05 203 65	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
9r	05 203 05	Lenkrad Soft 5" mit Kunststofffelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
9s	05 201 66	Lenkrad 5" Skater mit LED	2 St.
9t	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
9u	05 203 06	Lenkrad Soft 6" mit Kunststofffelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.




# Lenkradadapter mit Schraubachse kurz



(schwarz eloxiert)

## Montage

rechts

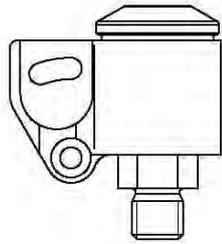


links

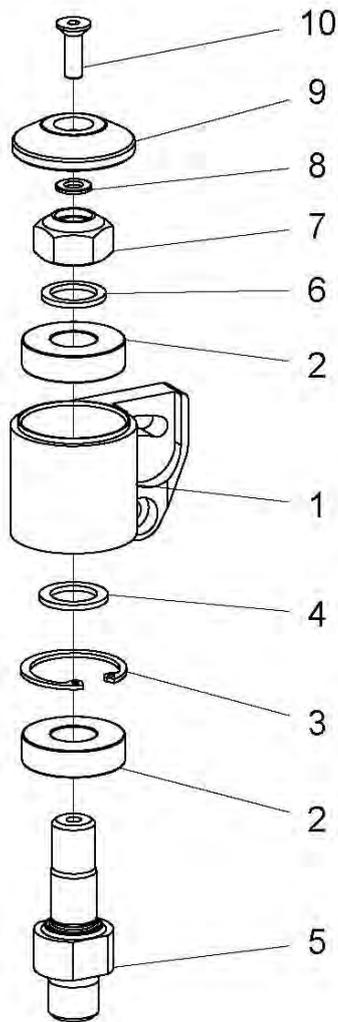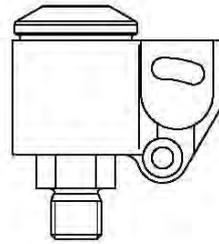

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 10	25 642 20V	Lenkradadapter kurz rechts kpl. Lenkradadapter rechts mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel schwarz eloxiert	1 St.
1b - 10	25 642 30V	Lenkradadapter kurz links kpl. Lenkradadapter links mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel schwarz eloxiert	1 St.
1a - 4	25 642 20	Lenkradadapter kurz rechts mit Lager (schwarz eloxiert)	1 St.
1b - 4	25 642 30	Lenkradadapter kurz links mit Lager (schwarz eloxiert)	1 St.
1a	25 642 21	Lenkradadaptergehäuse kurz rechts (schwarz eloxiert)	1 St.
1b	25 642 31	Lenkradadaptergehäuse kurz links (schwarz eloxiert)	1 St.
2	05 290 01	Rillenkugellager d=12,7mm	4 St.
3	01 338 21	Sicherungsring I28 - DIN 472 A2	2 St.
4	01 328 11	Passscheibe 13x19x1,5	2 St.
5	25 642 98	Schraubachse kurz (L=58mm)	2 St.
6	01 330 04	Schnorr-Sicherungsscheibe NM12	2 St.
7	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985 A2	2 St.
8	01 320 01	Scheibe 5,2 - DIN 125	2 St.
9	25 642 11	Deckel für Lenkradadapter kurz (schwarz eloxiert)	2 St.
10	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991 A2	2 St.

**Lenkrad FILOU mit Schraubachse kurz**

**(farbig beschichtet)**

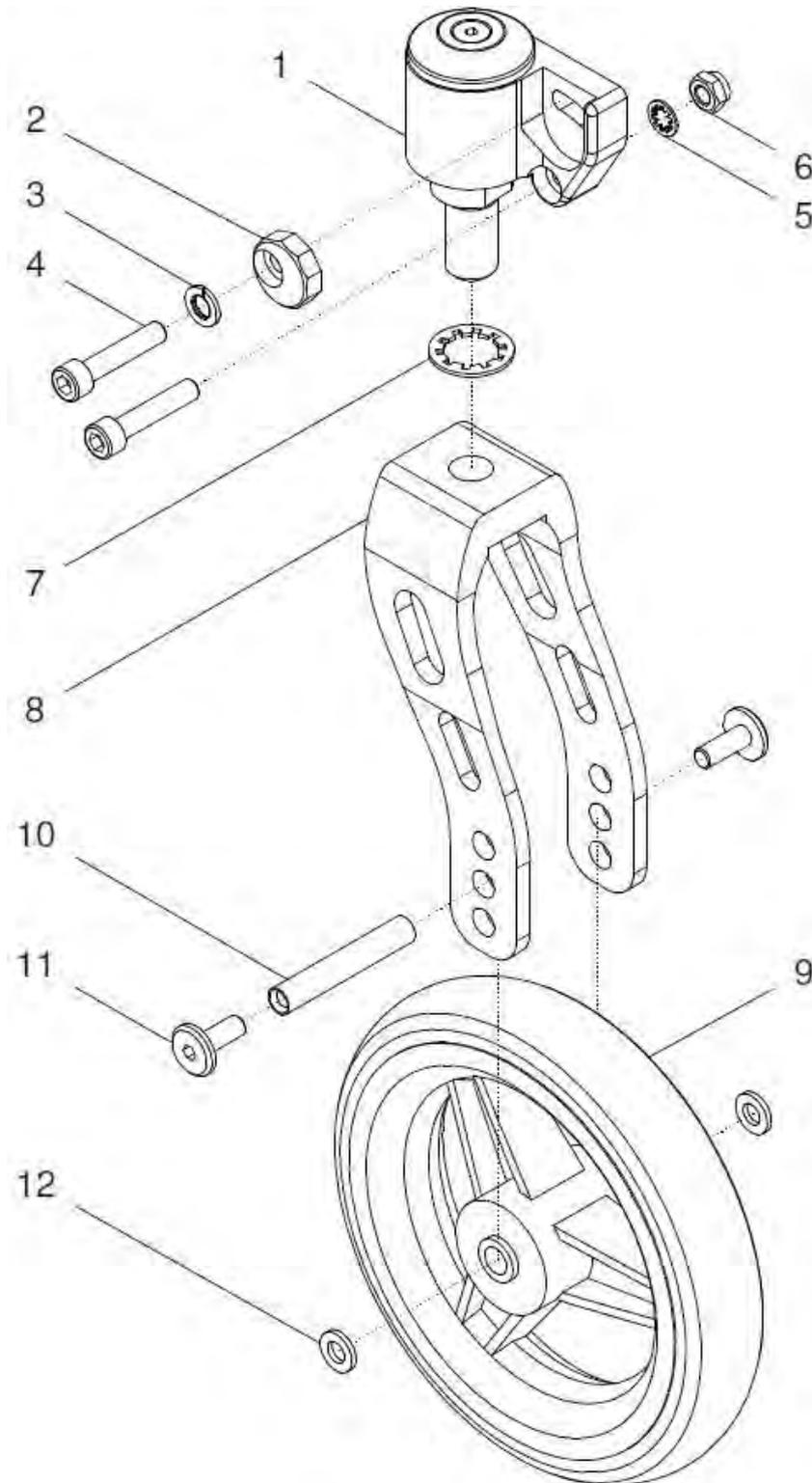

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	25 640 15	<b>Lenkradsatz 4“/ 5“/ 6“ Design-Lenkradgabel 39x132 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (39x132) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? FM: ? (Lenkradgabel, Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1 – 12	25 640 55	<b>Lenkradsatz 4“/ 5“/ 6“ Design-Lenkradgabel 39x170 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (39x170) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? FM: ? (Lenkradgabel, Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1 – 12	25 640 85	<b>Lenkradsatz 140mm Design-Lenkradgabel 45x145 kpl.</b> Design-Lenkradgabel kurz (45x145) mit Lenkrad .... Lenkradadapter kurz mit Schraubachse kurz und mit Befestigung Lenkrad: ? (140mm grau oder 140mm schwarz) FM: ? (Lenkradgabel, Lenkradadapter kurz und Deckel)	1 Paar
1a - 7	25 642 25F	<b>Lenkradadapter kurz rechts farbig mit Exzentrerscheibe kpl.</b> Lenkradadapter kurz rechts farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel, mit Exzentrerscheiben und mit Befestigung FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
1b - 7	25 642 35F	<b>Lenkradadapter kurz links farbig mit Exzentrerscheibe kpl.</b> Lenkradadapter kurz links farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel, mit Exzentrerscheiben und mit Befestigung FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
1a	25 642 20W	<b>Lenkradadapter kurz rechts farbig mit Schraubachse kpl.</b> <b>Lenkradadapter rechts farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel</b> FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
1b	25 642 30W	<b>Lenkradadapter kurz links farbig mit Schraubachse kpl.</b> <b>Lenkradadapter links farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel</b> FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
2	25 642 12	Exzentrerscheibe für Lenkradadapter kurz	2 St.
3	01 334 03	Keilsicherungsscheibenpaar Nord-Lock 6,5	2 St.
4	01 160 75B	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912 vz	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
6	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
7	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM14	2 St.
8a	45 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“) FM: ?	2 St.
8b	45 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, farbig (für Lenkrad 4“, 5“ oder 6“) FM: ?	2 St.

8c	45 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, farbig FM: ?	(für Lenkrad 140mm)	2 St.
9a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi		2 St.
9b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi		2 St.
9c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi		2 St.
9d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift		2 St.
9e	05 201 11	Lenkrad 140mm Soft-Vollgummi		2 St.
10a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm	(für Lenkradgabel 39x132 / 170)	2 St.
10b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm	(für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
11	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz		4 St.
12a	01 320 03	Scheibe DIN 125 8,4	(bei Lenkrad 4" Vollgummi)	4 St.
12b	--	ohne Scheibe	(bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi)	--
12c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5 für Lenkrad	(bei Skater und LED 4" und 5")	4 St.
12d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm	(bei Lenkrad 4" und 5" Alu Soft)	4 St.
12e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm	(bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	4 St.

### Sonderräder

9f	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz		2 St.
9g	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz		2 St.
9h	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz		2 St.
9i	05 201 65	Lenkrad 4" Skater mit LED		2 St.
9j	05 201 55	Lenkrad 4" Skater		2 St.
9k	05 203 14	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz		2 St.
9l	05 203 64	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz		2 St.
9m	05 201 44	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz		2 St.
9n	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz		2 St.
9o	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz		2 St.
9p	05 203 15	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz		2 St.
9q	05 203 65	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz		2 St.
9r	05 203 05	Lenkrad Soft 5" mit Kunststofffelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz		2 St.
9s	05 201 66	Lenkrad 5" Skater mit LED		2 St.
9t	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz		2 St.
9u	05 203 06	Lenkrad Soft 6" mit Kunststofffelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz		2 St.




# Lenkradadapter mit Schraubachse kurz



(farbig beschichtet)

## Montage

rechts

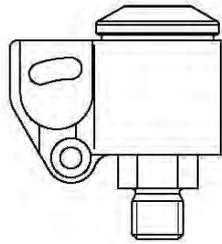

links

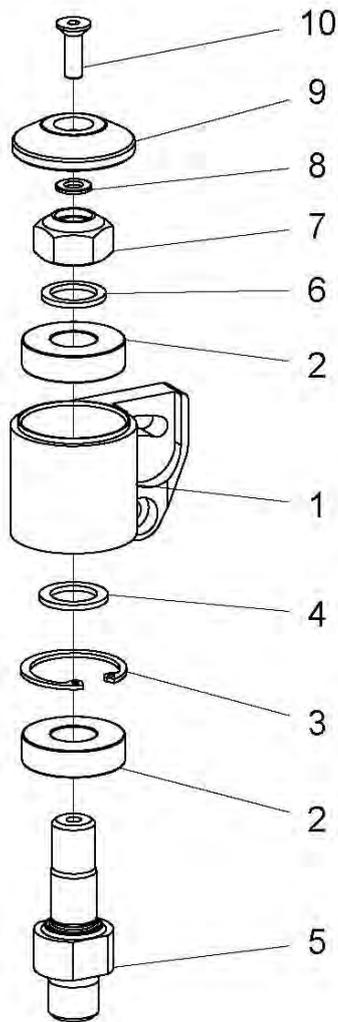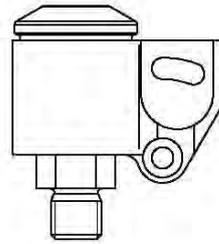


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 10	25 642 20W	<b>Lenkradadapter kurz rechts farbig mit Schraubachse kpl.</b> <b>Lenkradadapter rechts farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel</b> FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
1b - 10	25 642 30W	<b>Lenkradadapter kurz links farbig mit Schraubachse kpl.</b> <b>Lenkradadapter links farbig mit Lager, Schraubachse kurz und Deckel</b> FM: ? (Lenkradadapter und Deckel)	1 St.
1a - 4	25 642 20F	<b>Lenkradadapter kurz rechts farbig mit Lager</b> FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
1b - 4	25 642 30F	<b>Lenkradadapter kurz links farbig mit Lager</b> FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
1a	25 642 21F	Lenkradadaptergehäuse kurz rechts farbig FM: ?	1 St.
1b	25 642 31F	Lenkradadaptergehäuse kurz links farbig FM: ?	1 St.
2	05 290 01	Rillenkugellager d=12,7mm	4 St.
3	01 338 21	Sicherungsring I28 - DIN 472 A2	2 St.
4	01 328 11	Passscheibe 13x19x1,5	2 St.
5	25 642 98	Schraubachse kurz (L=58mm)	2 St.
6	01 330 04	Schnorr-Sicherungsscheibe NM12	2 St.
7	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985 A2	2 St.
8	01 320 01	Scheibe 5,2 - DIN 125	2 St.
9	25 642 11F	Deckel für Lenkradadapter kurz FM: ?	2 St.
10	01 120 03	Senkschraube M5x16 - DIN 7991 A2	2 St.




# Bremse

## Gruppe 7

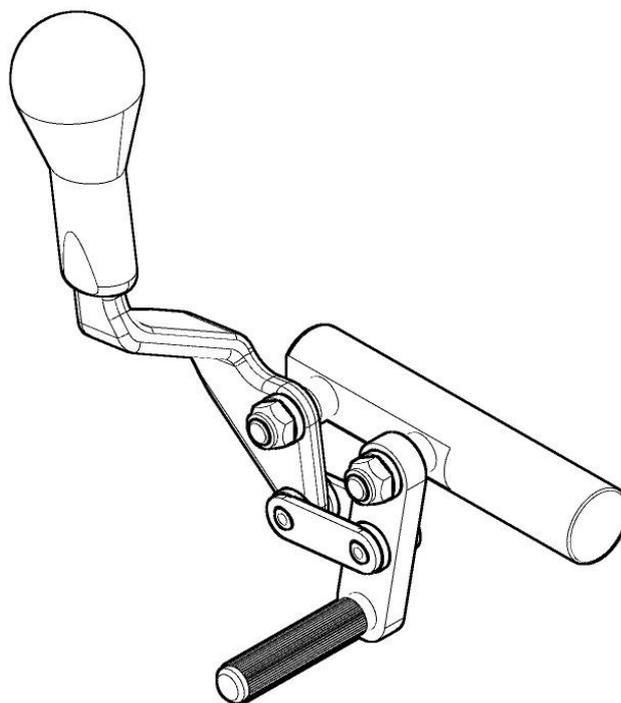



### Kniehebelbremse schräg

(nur bei Rahmen gerade möglich !!!)

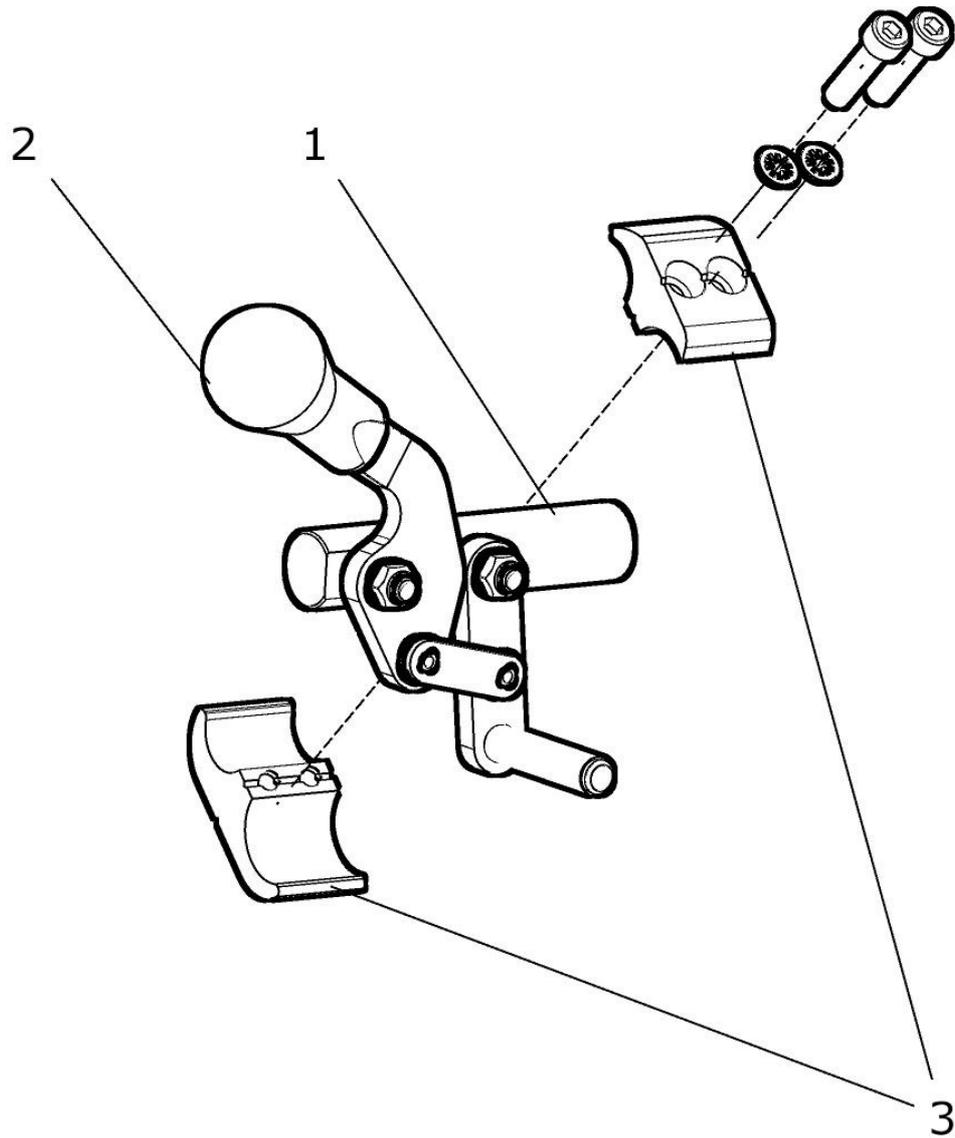

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	50 740 00	<b>Kniehebelbremse schräg (Paar) kpl.</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 3	50 742 00	<b>Kniehebelbremse schräg (rechts) kpl.</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 3	50 743 00	<b>Kniehebelbremse schräg (links) kpl.</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1a - 2	50 742 01	Kniehebelbremse schräg rechts kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b - 2	50 743 01	Kniehebelbremse schräg links kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

**Kniehebelbremse abgekröpft (mit kurzem Hebelweg)**

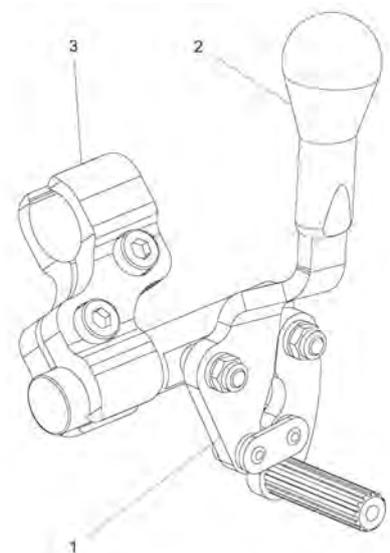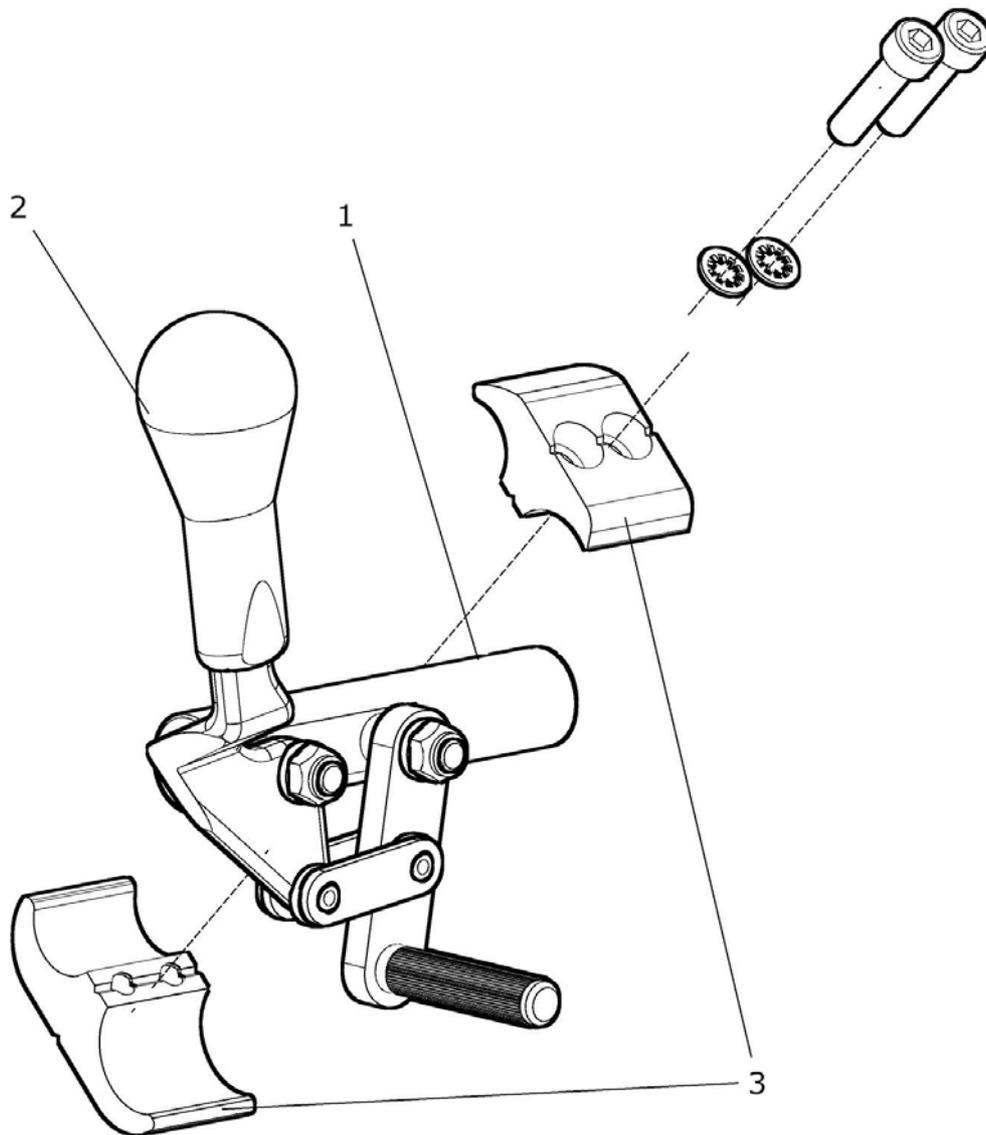


Kniehebelbremse mit Sonder-Bremshalter

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	25 720 00	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft (Paar) kpl.</b> mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1a – 3	25 722 00	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft (rechts) kpl.</b> mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 3	25 723 00	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft (links) kpl.</b> mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a – 2	25 722 01	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts kpl.</b> mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b – 2	25 723 01	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft links kpl.</b> mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3d	25 721 00	Bremshalter versetzt rechts / links kpl. (Typ D)	1 Paar
3d.1	25 721 20	Bremshalter versetzt rechts kpl. (Typ D)	1 St.
3d.2	25 721 30	Bremshalter versetzt links kpl. (Typ D)	1 St.

**Sonder-Bremshalter:**


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e.1	25 721 40	Bremshalter versetzt kurz rechts kpl. (Typ E)	1 St.
3e.2	25 721 50	Bremshalter versetzt kurz links kpl. (Typ E)	1 St.
3f.1	25 722 20	Bremshalter versetzt lang rechts kpl. (Typ F)	1 St.
3f.2	25 722 30	Bremshalter versetzt lang links kpl. (Typ F)	1 St.
3g.1	25 726 20	Bremshalter versetzt 55 rechts kpl. (Typ G)	1 St.
3g.2	25 726 30	Bremshalter versetzt 55 links kpl. (Typ G)	1 St.
3h	28 721 10	Bremshalter kurz schmal kpl. (Typ H)	2 St.

**Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Verlängerung abklappbar**

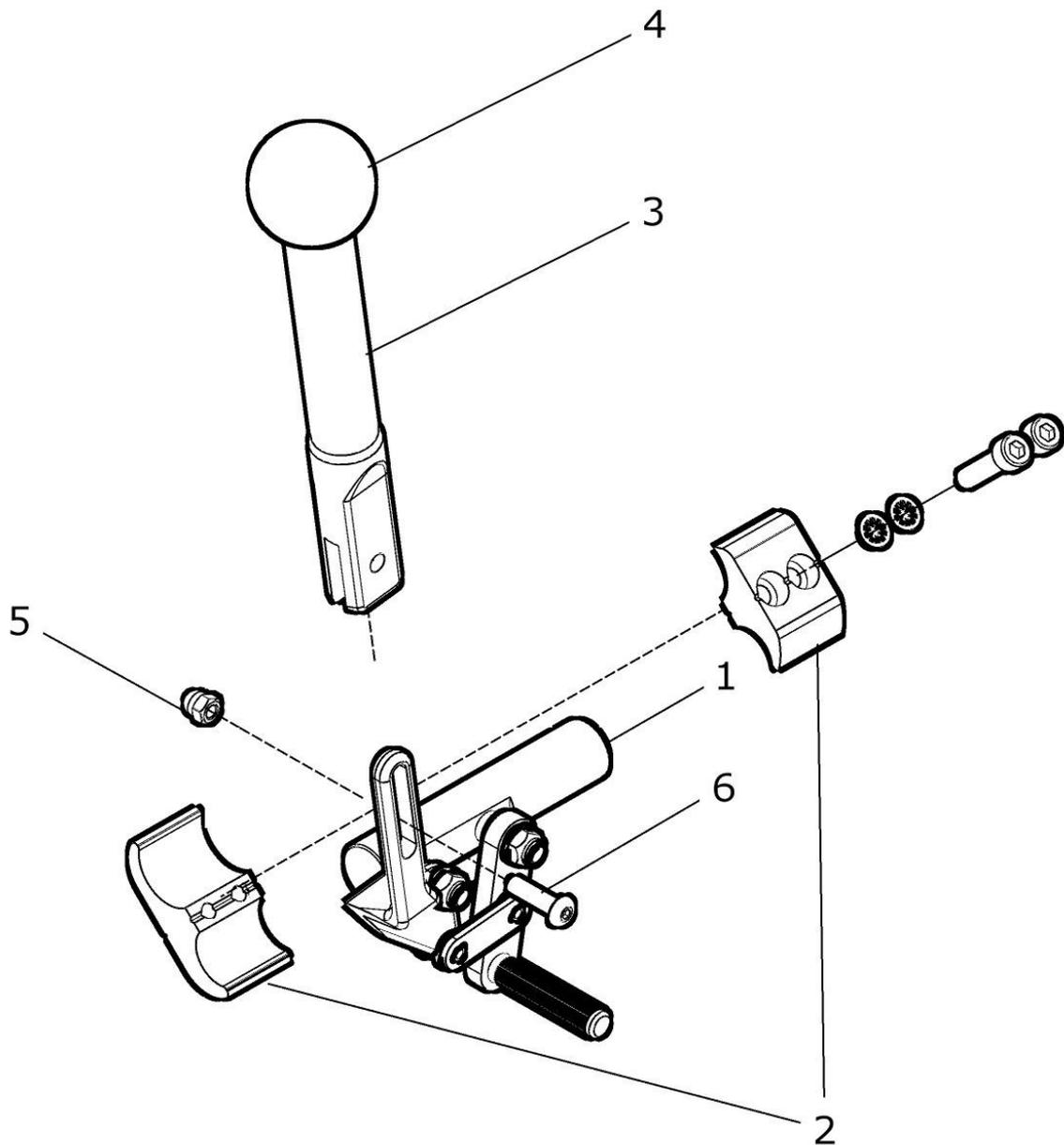


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
<b>1 – 6</b>	<b>25 730 00</b>	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Verlg. abklappb. Paar kpl.</b> mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>1 Paar</b>
<b>1a – 6</b>	<b>25 732 00</b>	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. rechts kpl.</b> mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>1 St.</b>
<b>1b – 6</b>	<b>25 733 00</b>	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. links kpl.</b> mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>1 St.</b>
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
<b>3 – 6</b>	<b>50 751 00</b>	<b>Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.</b>	<b>2 St.</b>
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.

## Betätigung Trommelbremse (für Begleitperson)

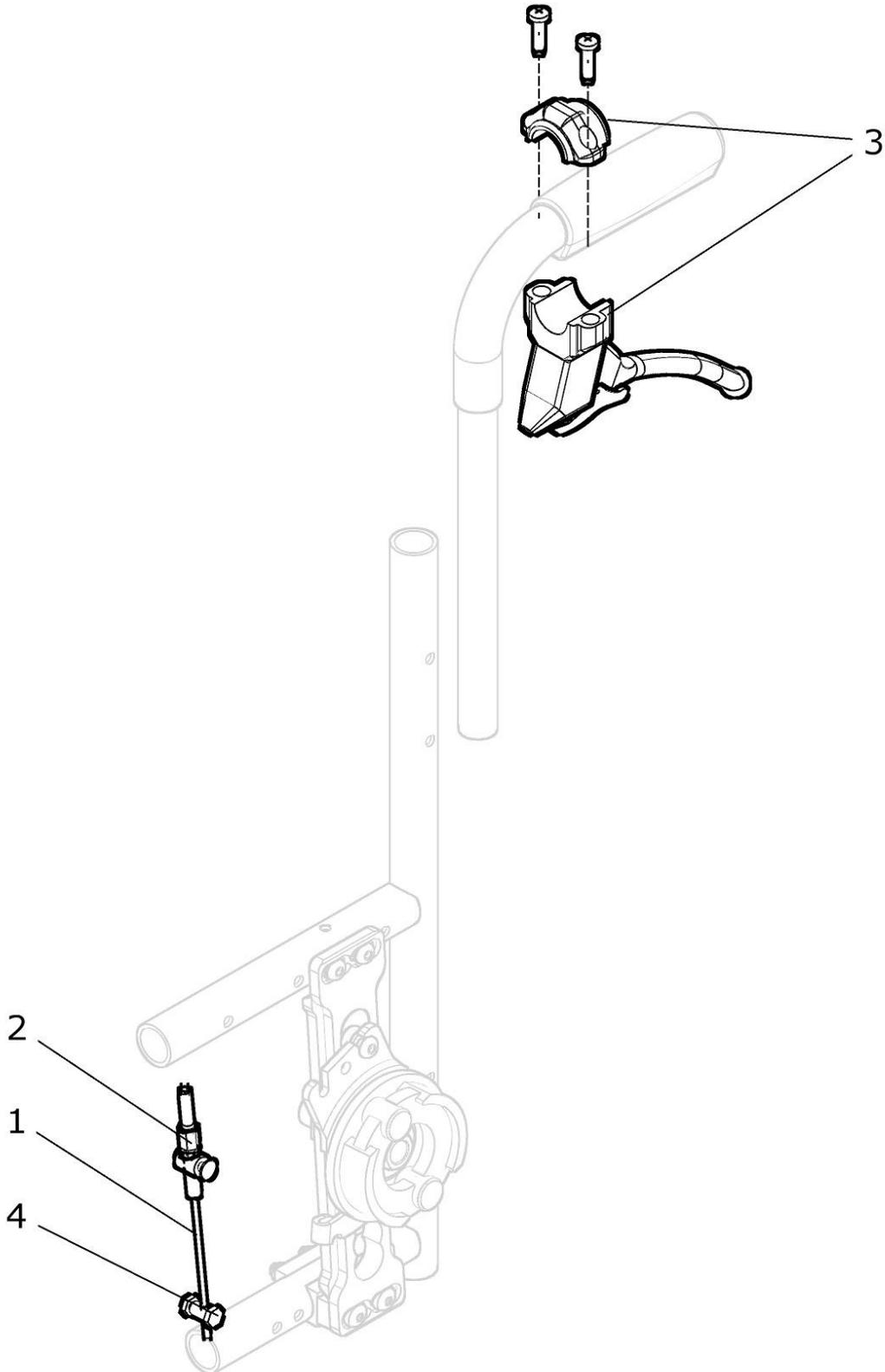



Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	50 730 00	<b>Betätigung für Trommelbremse kpl.</b> Bremsgriff mit Bowdenzug, Einstellautomatik und Klemmnippel RH: ? Schiebegriff höhenverstellbar: ?	2 St.
1a	50 731 01	Bowdenzug 650 / 790 für Trommelbremse (RH 20-35 standard / RH 20 -30 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1b	50 731 11	Bowdenzug 880 / 1020 für Trommelbremse (RH 40 - 55 standard / RH 35 - 50 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1c	50 731 21	Bowdenzug 1050/1190 für Trommelbremse (RH 50 - 55 Schgr. höhenv. 15cm und für Schgr. lang / extra lang)	2 St.
2	05 402 00	Einstellautomatik für Bowdenzug kpl.	2 St.
3	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
4	05 402 20	Klemmnippel	2 St.

# Einhandbremse

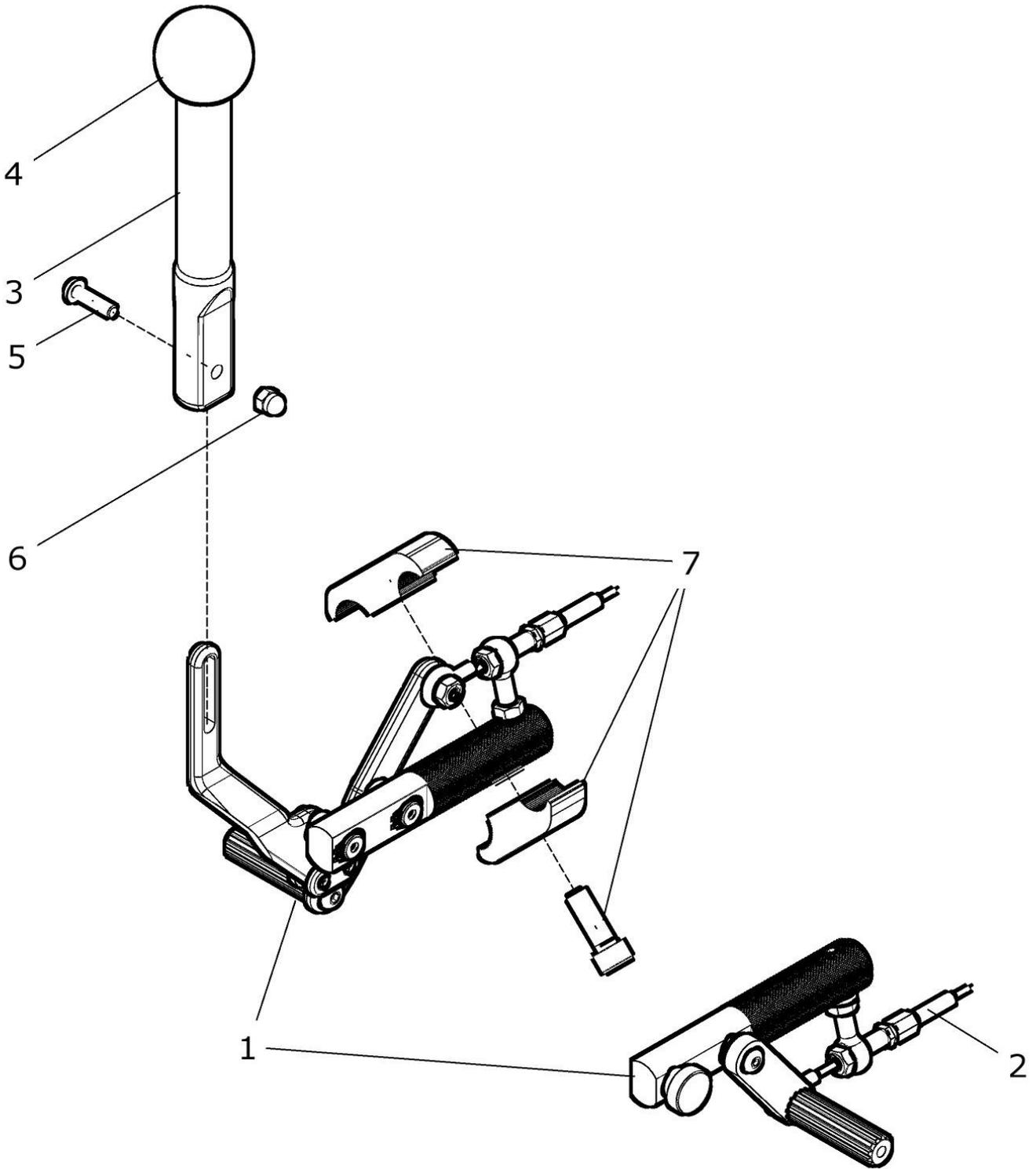


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	25 750 20	<b>Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt kpl.</b> abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1a - 2	25 750 21	<b>Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt</b> mit Bowdenzug standard	1 St.
2a	50 721 30	Bowdenzug kurz für Einhandbremse (bis SB 50cm) / standard	1 St.
2b	50 721 40	Bowdenzug lang für Einhandbremse (ab SB 52cm)	1 St.
3 - 6	50 751 00	<b>Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.</b>	1 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	1 St.
4	01 251 21	Kugel	1 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	1 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	1 St.
7a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
7b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
7c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
7d	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl. (Typ D) standard	1 Paar
1b - 7	25 750 30	<b>Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt kpl.</b> abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung links mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1b - 2	25 750 31	<b>Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt</b> mit Bowdenzug standard	1 St.

## Montage - Hinweis Einhandbremse

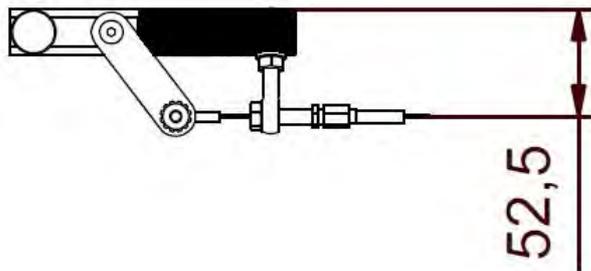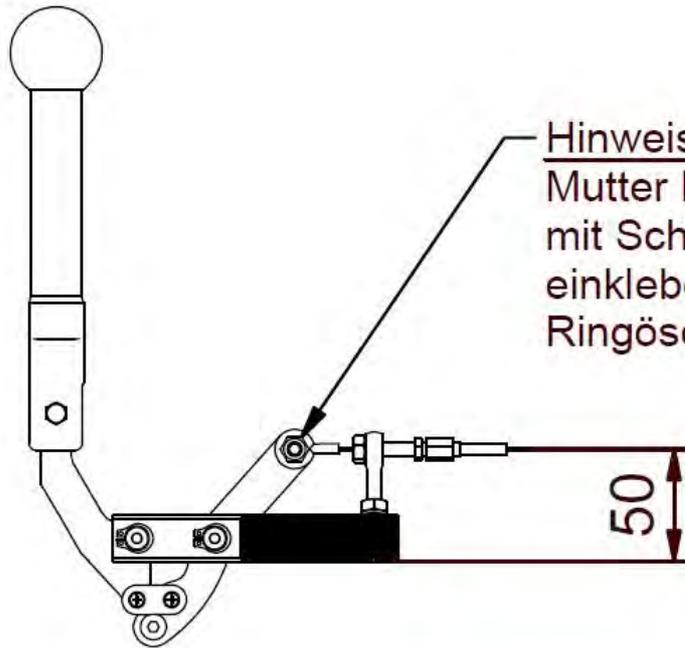



## Druckbremse für Begleitperson

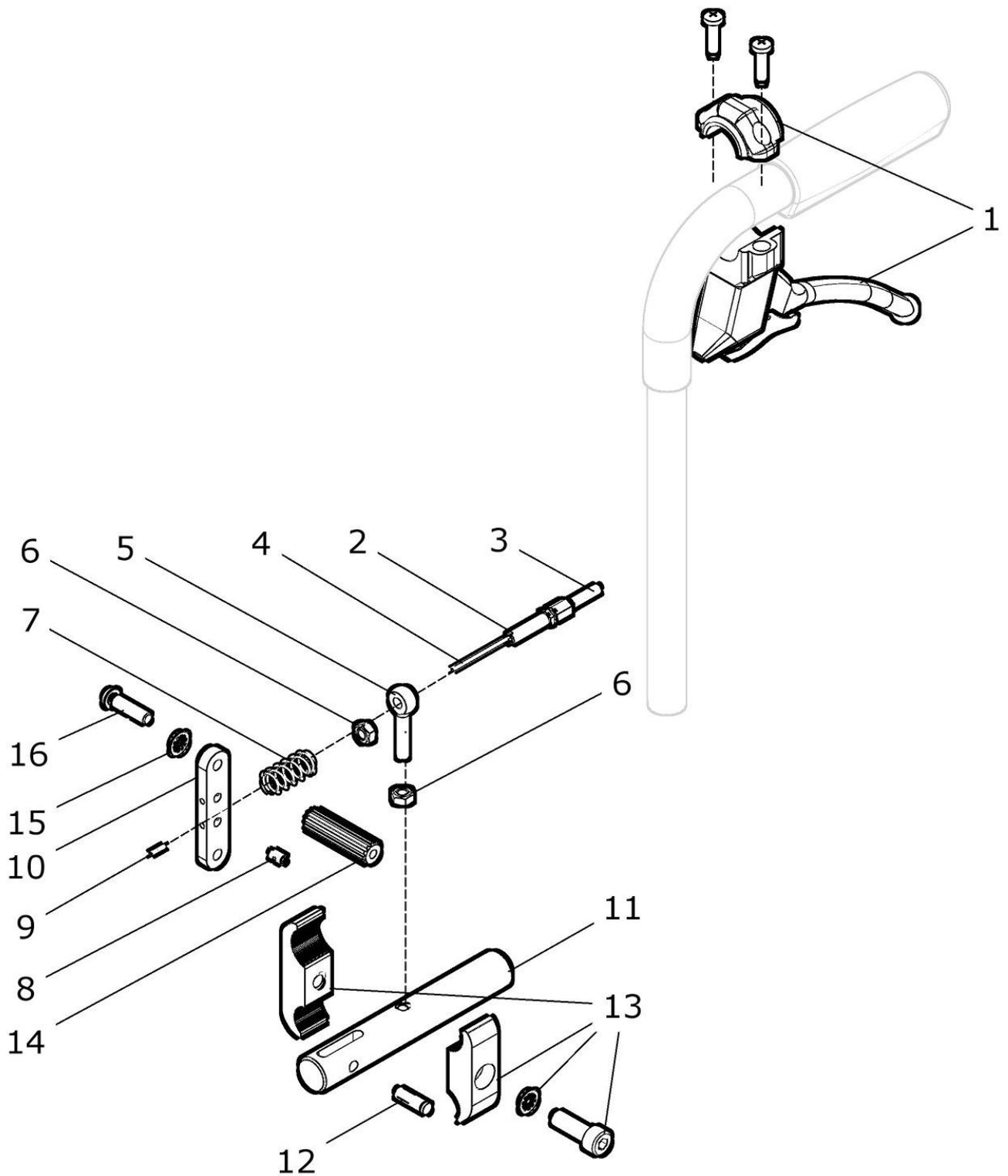


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	22 750 00	<b>Druckbremse für Begleitperson kpl.</b> Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 Paar
1 - 16	22 752 00	<b>Druckbremse für Begleitperson rechts kpl.</b> Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten rechts am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 16	22 753 00	<b>Druckbremse für Begleitperson links kpl.</b> Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten links am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 9	22 751 00	<b>Bowdenzug Druckbremse mit Bremsgriff Begleitperson kpl.</b> Bowdenzug mit Bremsgriff und mit Einstellautomatik, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
2 - 4	22 751 05	<b>Bowdenzug für Druckbremse kpl.</b>	2 St.
2	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
3	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
5	01 180 02	Augenschraube B M6x25 - DIN 444	2 St.
6	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	4 St.
7	02 110 09	Druckfeder	2 St.
8	05 402 28	S-Nippel	2 St.
9	05 402 72	Aderendhülse L=10mm	2 St.
10 - 16	22 752 10	<b>Druckbremse unten am Rahmen rechts kpl.</b> (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff)	1 St.
10 - 16	22 753 10	<b>Druckbremse unten am Rahmen links kpl.</b> (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff)	1 St.
10	25 741 32	Stegbolzen	2 St.
11a	25 741 61	Gabelbolzen lang gerade (=standard) (meistens SPRINT / SLADE)	2 St.
11b	25 741 41	Gabelbolzen 20° abgekröpft 25mm (meistens FINDUS)	2 St.
11c	25 741 46	Gabelbolzen 20° abgekröpft 45mm (meistens FINDUS)	2 St.
11d	25 741 31	Gabelbolzen gerade (meistens FILOU)	2 St.

12	01 411 72	Knebelkerbstift Ø6x20 - DIN 1475	2 St.
13a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
13b	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl. (Typ D)	1 Paar
14a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)	2 St.
14b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm	2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
16	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.



**Kniehebelbremse kurz mit Bowdenzug für Begleitperson**

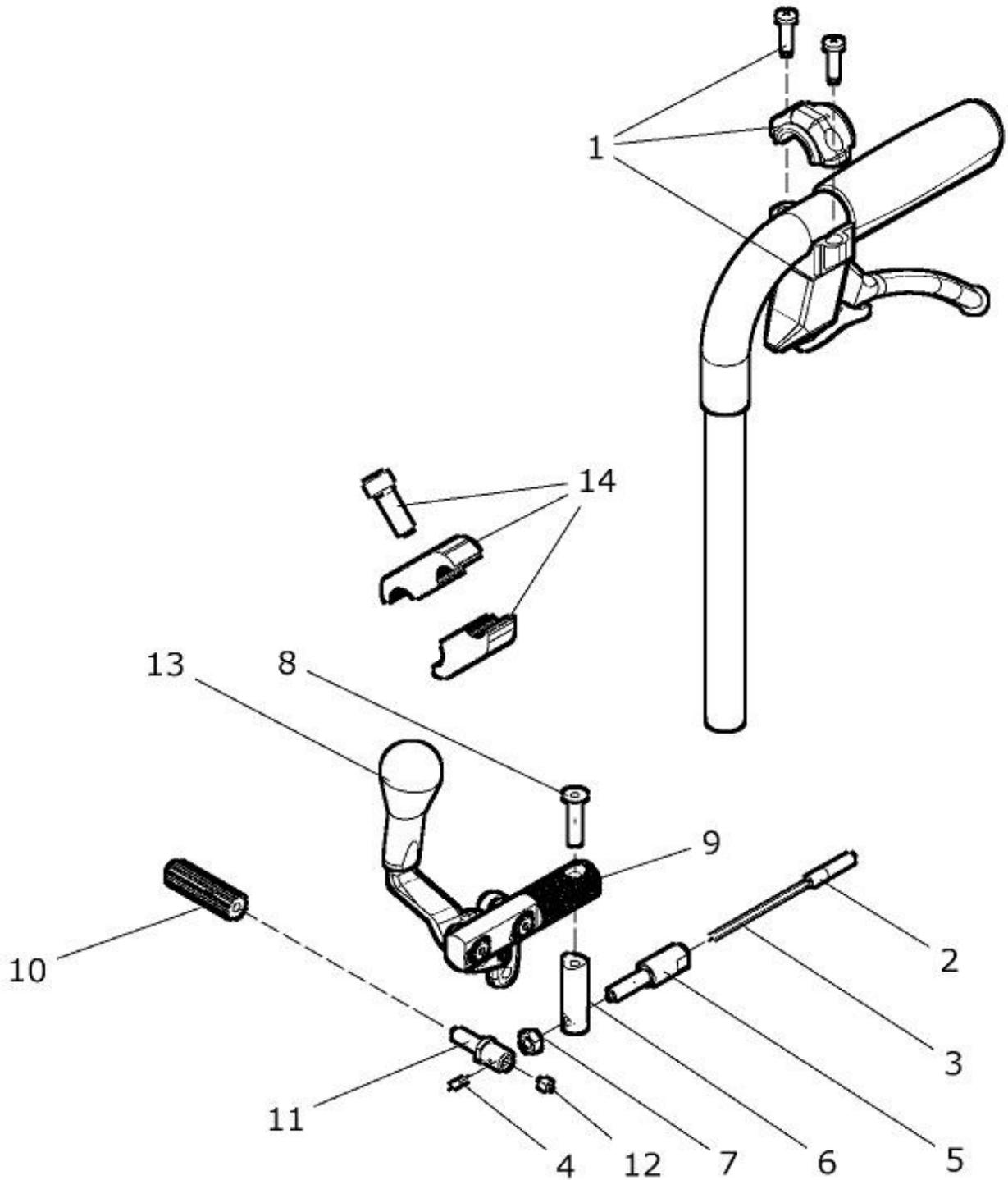


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	22 740 00	<b>Kniehebelbremse abgekr. mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.</b> Kniehebelbremse abgekröpft kurz angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1 – 9a, 10 - 14	22 742 00	<b>Kniehebelbremse rechts mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.</b> Kniehebelbremse abgekröpft rechts angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 – 9b, 10 - 14	22 743 00	<b>Kniehebelbremse links mit Bowdenzug für Begleitperson kpl.</b> Kniehebelbremse abgekröpft links angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 – 8	22 741 10	<b>Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl.</b> Bowdenzug mit Bremsgriff MAG und mit Gewindehülse, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1 – 4	22 741 40	<b>Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse</b>	2 St.
1	22 741 45	Bremsgriff MAG mit Gewinde M5	2 St.
2 – 4	22 741 30	<b>Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl.</b> Die Bowdenzughülle und der Innenzug wird beim Einbau entsprechend gekürzt	2 St.
2	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
3	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 402 72	Aderendhülse L=10mm	2 St.
5	22 741 21	Gewindehülse M6 für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
6	22 741 61	Distanzbolzen für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
7	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	2 St.
8	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
9a - 12	22 742 10	<b>Kniehebelbremse kurz rechts mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl.</b> ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9b - 12	22 743 10	<b>Kniehebelbremse kurz links mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl.</b> ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9a	22 742 11	Kniehebelbremse kurz rechts für Bowdenzug / ohne Andruckbolzen Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.

9b	22 743 11	Kniehebelbremse kurz links für Bowdenzug Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.
10a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)	2 St:
10b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm	2 St:
11	22 751 11	Gewindebolzen M6 / M5	2 St.
12	01 131 01	Gewindestift M5x6 - DIN 913	2 St.
13	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
14	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.




### Kniehebelbremse „ Pull to lock “

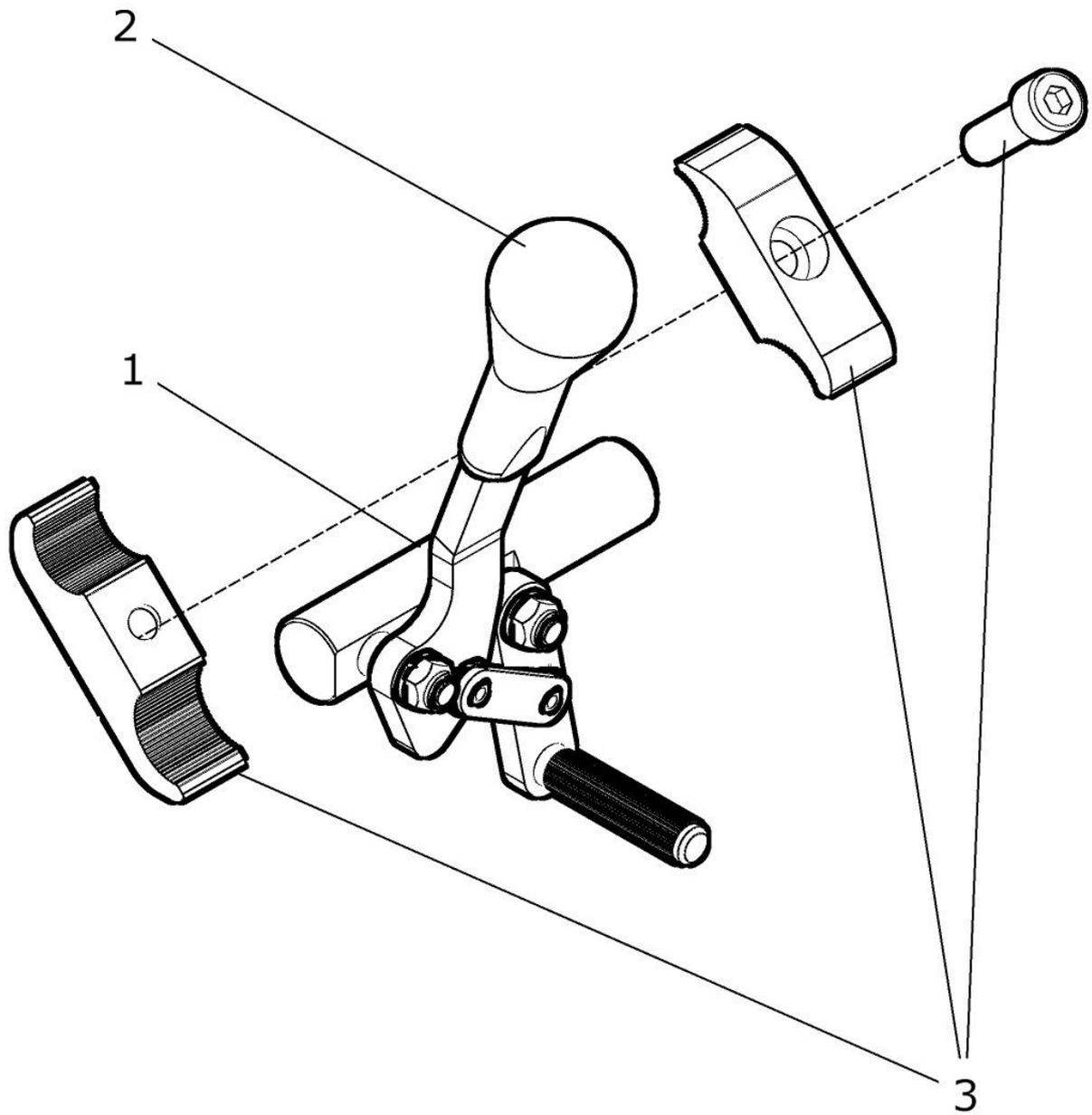

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung			Menge
1 – 3	50 760 00	<b>Kniehebelbremse „Pull to lock“</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>(Paar)</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 Paar</b>
1a – 3	50 760 20	<b>Kniehebelbremse „Pull to lock“</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>rechts</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>
1b – 3	50 760 30	<b>Kniehebelbremse „Pull to lock“</b> mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	<b>links</b>	<b>kpl.</b>	<b>1 St.</b>
1a	50 762 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	rechts	kpl.	1 St.
1b	50 763 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	links	kpl.	1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval			2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz	kpl.	(Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang	kpl.	(Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal	kpl.	(Typ C)	2 St.

**Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Rastbolzen**

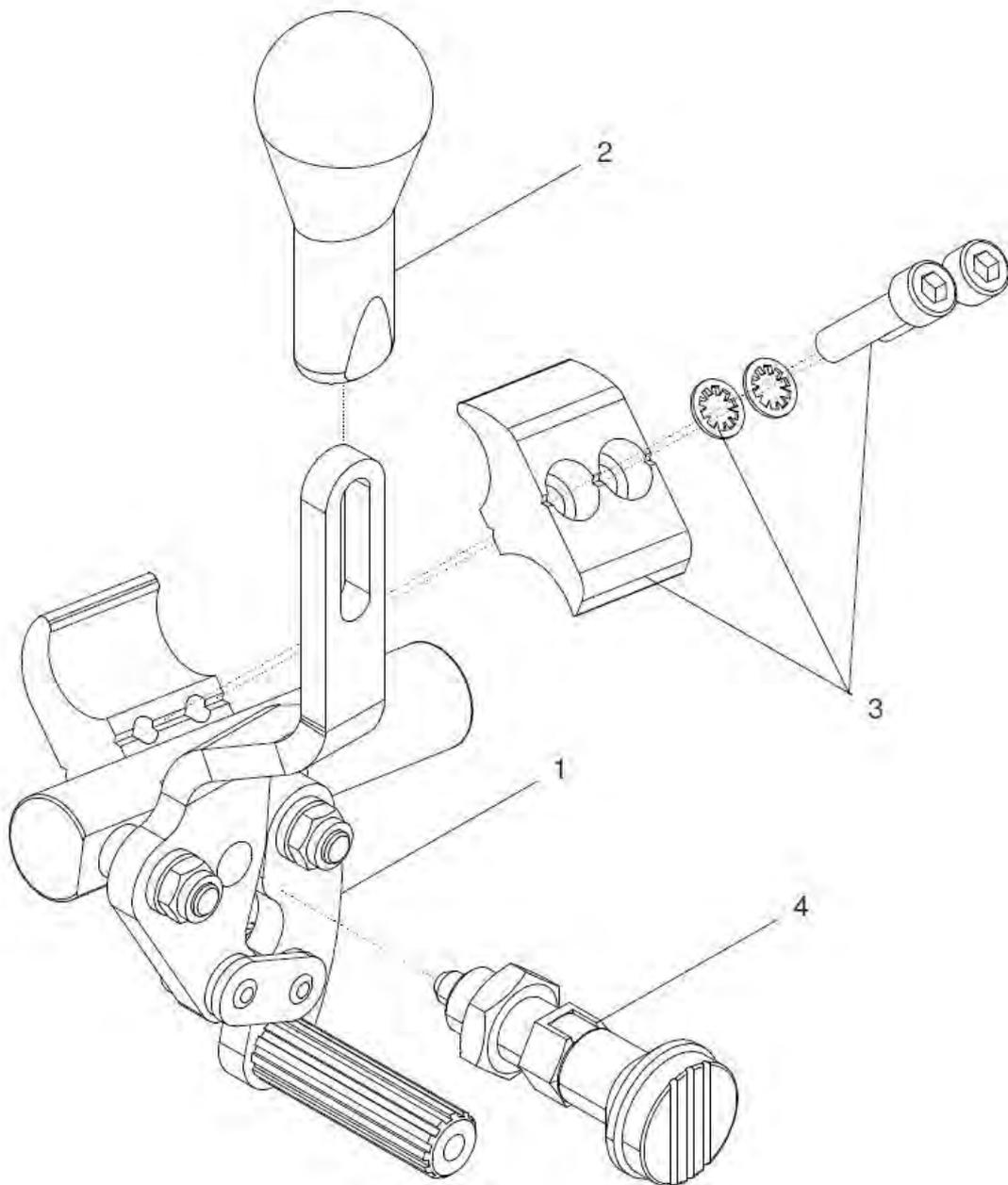

## Kniehebelbremse arretiert im gebremsten Zustand

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	25 728 00	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft / Rastbolzen geschl. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1a – 4	25 728 02	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts / Rastbolzen geschl. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 4	25 728 03	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft links / Rastbolzen geschl. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a – 2, 4	25 728 20	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts / Rastbolzen /o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 2, 4	25 728 30	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft links / Rastbolzen /o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a	25 728 21	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts / o. Rastbolzen /o. Halter Kniehebelbremse kurz rechts für Arretierung im gebremsten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b	25 728 31	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links / o. Rastbolzen /o. Halter Kniehebelbremse kurz links für Arretierung im gebremsten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3d	25 721 00	Bremshalter versetzt rechts / links kpl. (Typ D)	1 Paar
3d.1	25 721 20	Bremshalter versetzt rechts kpl. (Typ D)	1 St.
3d.2	25 721 30	Bremshalter versetzt links kpl. (Typ D)	1 St.
4	01 133 03	Arretierbolzen mit Rastnut (Ø5 / M10x1)	2 St.


## Kniehebelbremse arretiert im gebremsten und offenen Zustand

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	25 728 50	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft / Rastbolzen / Doppel. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand <b>und</b> für Arretierung im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1a – 4	25 728 56	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts / Rastbolzen / Dopp. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand <b>und</b> für Arretierung im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 4	25 728 57	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft links / Rastbolzen / Dopp. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand <b>und</b> für Arretierung im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a – 2, 4	25 728 60	<b>Kniehebelbremse kurz abgekr. rechts Dopp./ mit Rastb./o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand <b>und</b> für Arretierung im geöffneten Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 2, 4	25 728 70	<b>Kniehebelbremse kurz abgekr. links Dopp. / mit Rastb./o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im gebremsten / betätigtem Zustand <b>und</b> für Arretierung im geöffneten Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a	25 728 61	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts Dopp / o. Rastb./o. Halter Kniehebelbremse kurz rechts für Arretierung im gebremsten Zustand und geöffneten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b	25 728 71	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links Dopp./ o. Rastb./o. Halter Kniehebelbremse kurz links für Arretierung im gebremsten Zustand und geöffneten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3d	25 721 00	Bremshalter versetzt rechts / links kpl. (Typ D)	1 Paar
3d.1	25 721 20	Bremshalter versetzt rechts kpl. (Typ D)	1 St.
3d.2	25 721 30	Bremshalter versetzt links kpl. (Typ D)	1 St.
4	01 133 03	Arretierbolzen mit Rastnut (Ø5 / M10x1)	2 St.

## Kniehebelbremse arretiert im offenen Zustand

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	25 729 00	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft / Rastbolzen / offen kpl.</b> Kniehebelbremse kurz (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1a – 4	25 729 02	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts / Rastbolzen / offen kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 4	25 729 03	<b>Kniehebelbremse kurz abgekröpft links / Rastbolzen offen kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand und mit Halter mit Bremshalter: ? Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a – 2, 4	25 729 20	<b>Kniehebelbremse kurz abgekr. rechts / Rastb. offen /o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz rechts (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b – 2, 4	25 729 30	<b>Kniehebelbremse kurz abgekr. links / Rastb. offen /o. H. kpl.</b> Kniehebelbremse kurz links (mit kurzem Hebelweg) mit Griff und mit Rastbolzen für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand (ohne Halter) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1a	25 729 21	Kniehebelbremse kurz abgekr. rechts / Rastb./ offen /o. Halter kpl. Kniehebelbremse kurz rechts für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1b	25 729 31	Kniehebelbremse kurz abgekr. links / Rastb./ offen /o. Halter kpl. Kniehebelbremse kurz links für Arretierung der Bremse im geöffneten Zustand (ohne Rastbolzen / ohne Halter / ohne Bremshebelkappe) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3d	25 721 00	Bremshalter versetzt rechts / links kpl. (Typ D)	1 Paar
3d.1	25 721 20	Bremshalter versetzt rechts kpl. (Typ D)	1 St.
3d.2	25 721 30	Bremshalter versetzt links kpl. (Typ D)	1 St.
4	01 133 03	Arretierbolzen mit Rastnut (Ø5 / M10x1)	2 St.

**Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebelkappe (= standard)**

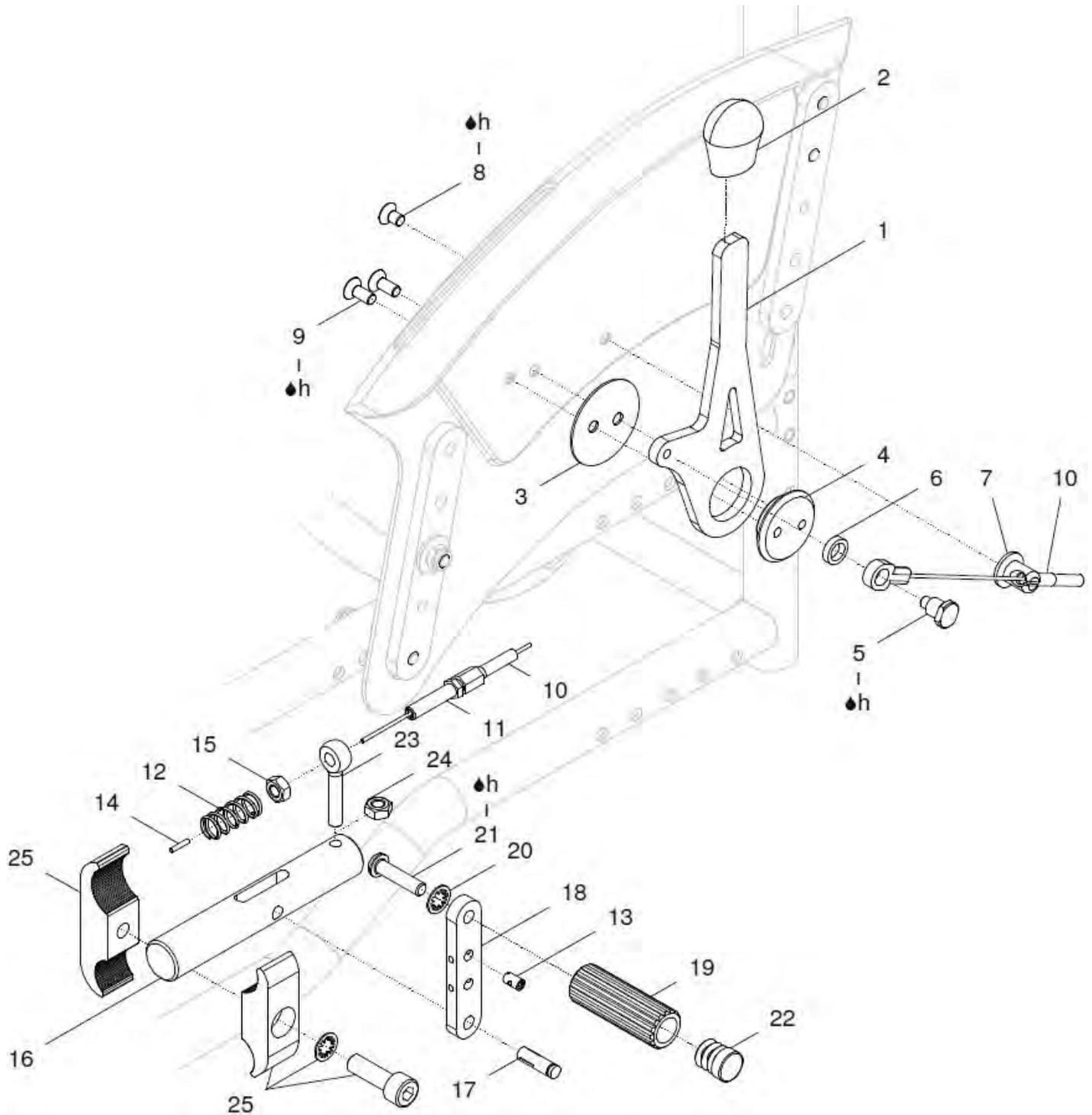


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 25	28 740 00	<b>Bremse im Seitenteil integriert mit Bremshebelkappe kpl. (ohne Kleiderschutz)</b> Bremshebel mit Kappe, mit Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 Paar
1 – 25	28 742 00	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1 – 25	28 743 00	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kappe, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1 – 9	25 742 20	<b>Bremshebel rechts für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel rechts mit Bremshebelkappe, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1 – 9	25 743 20	<b>Bremshebel links für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel links mit Bremshebelkappe, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1	29 711 01	Bremshebel lang für Bremshebelkappe	2 St.
2	25 741 89	Bremshebelkappe oval gekürzt	2 St.
3	25 741 25	Distanzscheibe PA Ø40x1mm	2 St.
4	25 741 22	Drehscheibe für Bremshebel	2 St.
5	25 741 23	Aufnahmebolzen M5 / Ø8	2 St.
6	25 741 26	Distanzscheibe	2 St.
7	25 741 24	Führungsbolzen für Bowdenzug	2 St.
8	01 120 01	Senkkopfschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
9	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991 A2	4 St.
10 - 15	25 741 10	<b>Bowdenzug für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bowdenzug mit Einstellschraube M6x34, Kontermutter M6, S-Nippel, Aderendhülse und Druckfeder (ohne Andruckbolzen)	2 St.
10	25 741 15	Bowdenzug f. Bremse im Seitenteil Innenzug (1020) mit Öse und Hülle (650)	2 St.
11	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
12	02 110 07	Druckfeder 1x7x40	2 St.
13	05 402 28	S-Nippel	2 St.
14	05 402 72	Aderendhülse Ø1,5 / 10mm	2 St.
15	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.

<b>16 - 24</b>	<b>25 742 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz rechts für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
<b>16 - 24</b>	<b>25 743 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz links für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
16	25 741 31	Gabelbolzen gerade kurz	2 St.
17	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
18	25 741 32	Stegbolzen	2 St.
19a	25 741 33	Andruckbolzen standard für Bremse im Seitenteil (standard / 50mm)	2 St.
19b	29 711 61	Andruckbolzen lang für Bremse im Seitenteil (lang / 70mm)	2 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
21	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 A2	2 St.
22	04 210 11	Verschlussstopfen D15x1	2 St.
23	01 180 05	Augenschraube B M6x40 - DIN 444 vz	2 St.
24	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
25a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (=standard bei Bremse im Seitenteil)	2 St.

**Kleiderschutz für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 4**



**Bremse im Seitenteil integriert mit Halbkugel geschraubt**

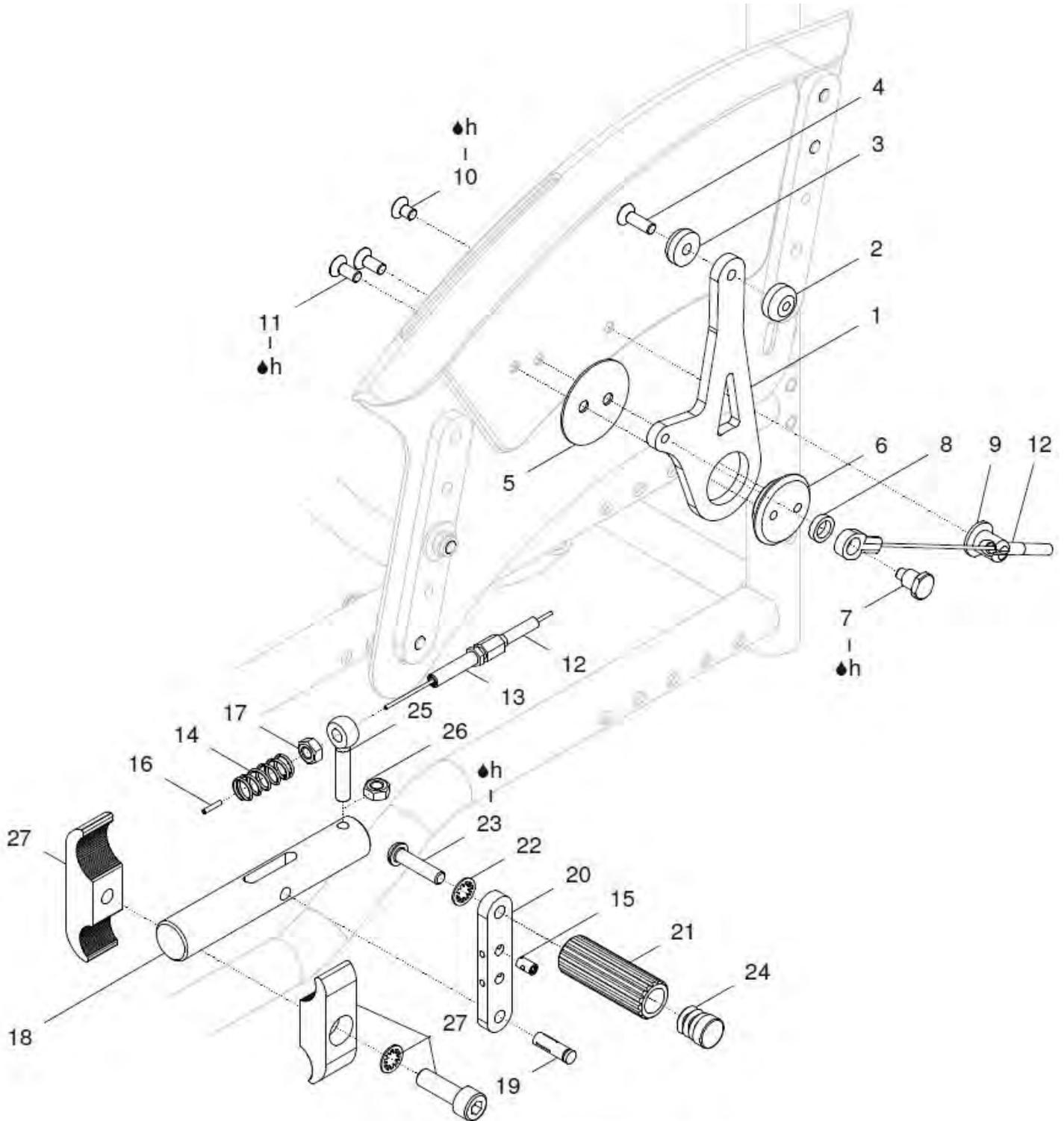


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 27	28 740 50	<b>Bremse im Seitenteil integriert mit Halbkugel geschraubt kpl. (ohne Kleiderschutz)</b> Bremshebel mit Halbkugel geschraubt, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 Paar
1 – 27	28 742 50	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Halbkugel geschraubt, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1 – 27	28 743 50	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Halbkugel geschraubt, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1 – 11	25 744 25	<b>Bremshebel rechts für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel rechts mit Halbkugel geschraubt, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1 – 11	25 744 35	<b>Bremshebel links für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel links mit Halbkugel geschraubt, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1	29 711 45	Bremshebel kurz für Halbschalen	2 St.
2	29 711 42	Halbschale (Halbkugel) M5 schwarz für Bremshebel	2 St.
3	29 711 41	Halbschale (Halbkugel) Ø5,2 schwarz für Bremshebel	2 St.
4	01 120 82F	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991 zns	2 St.
5	25 741 25	Distanzscheibe PA Ø40x1mm	2 St.
6	25 741 22	Drehscheibe für Bremshebel	2 St.
7	25 741 23	Aufnahmebolzen M5 / Ø8	2 St.
8	25 741 26	Distanzscheibe	2 St.
9	25 741 24	Führungsbolzen für Bowdenzug	2 St.
10	01 120 01	Senkkopfschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
11	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991 A2	4 St.
12 - 17	25 741 10	<b>Bowdenzug für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bowdenzug mit Einstellschraube M6x34, Kontermutter M6, S-Nippel, Aderendhülse und Druckfeder (ohne Andruckbolzen)	2 St.
12	25 741 15	Bowdenzug f. Bremse im Seitenteil Innenzug (1020) mit Öse und Hülle (650)	2 St.
13	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
14	02 110 07	Druckfeder 1x7x40	2 St.
15	05 402 28	S-Nippel	2 St.

16	05 402 72	Aderendhülse Ø1,5 / 10mm	2 St.
17	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
<b>18 – 26</b>	<b>25 742 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz rechts für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
<b>18 – 26</b>	<b>25 743 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz links für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
18	25 741 31	Gabelbolzen gerade kurz	2 St.
19	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
20	25 741 32	Stegbolzen	2 St.
21a	25 741 33	Andruckbolzen standard für Bremse im Seitenteil (standard / 50mm)	2 St.
21b	29 711 61	Andruckbolzen lang für Bremse im Seitenteil (lang / 70mm)	2 St.
22	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
23	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 A2	2 St.
24	04 210 11	Verschlussstopfen D15x1	2 St.
25	01 180 05	Augenschraube B M6x40 - DIN 444 vz	2 St.
26	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
27a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (=standard bei Bremse im Seitenteil)	2 St.

**Kleiderschutz für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 4**



**Bremse im Seitenteil integriert mit Kugel Ø32/M8**

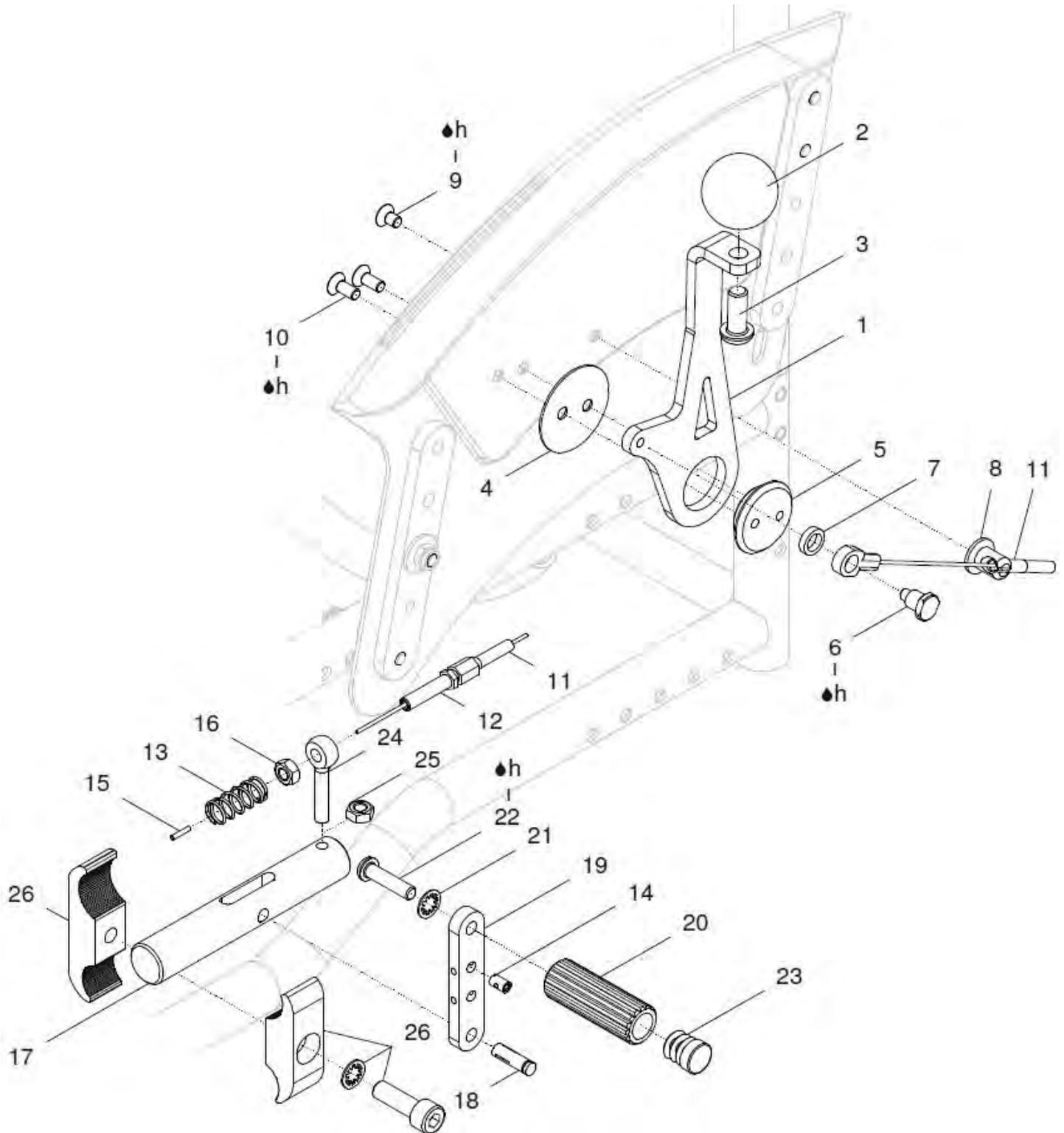

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 26	28 740 80	<b>Bremse im Seitenteil integriert mit Kugel Ø32/M8 (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel mit Kugel, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 Paar
1a – 26	25 742 80	<b>Bremse im Seitenteil integriert rechts (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel rechte Seite mit Kugel, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1b – 26	25 743 80	<b>Bremse im Seitenteil integriert links (ohne Kleiderschutz) kpl.</b> Bremshebel linke Seite mit Kugel, Bowdenzug, Andruckbolzen, Gabelbolzen gerade kurz und Bremshalter (ohne Seitenteile / ohne Kleiderschutz) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	1 St.
1a – 10	25 742 25	<b>Bremshebel rechts mit Kugel für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel rechts mit Kugel, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1b – 10	25 743 25	<b>Bremshebel links mit Kugel für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bremshebel links mit Kugel, Aufnahmebolzen und Führungsbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Andruckbolzen)	1 St.
1a	25 742 26	Bremshebel abgewinkelt rechts (für Kugel)	1 St.
1b	25 743 26	Bremshebel abgewinkelt links (für Kugel)	1 St.
2	26 711 06	Kugelknopf Ø32 / M8 schwarz	2 St.
3	01 154 40	Linsenkopfschraube M8x20 - ISO 7380 zns	2 St.
4	25 741 25	Distanzscheibe PA Ø40x1mm	2 St.
5	25 741 22	Drehscheibe für Bremshebel	2 St.
6	25 741 23	Aufnahmebolzen M5 / Ø8	2 St.
7	25 741 26	Distanzscheibe	2 St.
8	25 741 24	Führungsbolzen für Bowdenzug	2 St.
9	01 120 01	Senkkopfschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
10	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991 A2	4 St.
11 – 16	25 741 10	<b>Bowdenzug für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Bowdenzug mit Einstellschraube M6x34, Kontermutter M6, S-Nippel, Aderendhülse und Druckfeder (ohne Andruckbolzen)	2 St.
11	25 741 15	Bowdenzug f. Bremse im Seitenteil Innenzug (1020) mit Öse und Hülle (650)	2 St.
12	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
13	02 110 07	Druckfeder 1x7x40	2 St.
14	05 402 28	S-Nippel	2 St.

15	05 402 72	Aderendhülse Ø1,5 / 10mm	2 St.
16	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
<b>17 – 25</b>	<b>25 742 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz rechts für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
<b>17 – 25</b>	<b>25 743 35</b>	<b>Gabelbolzen gerade kurz links für Bremse im Seitenteil kpl.</b> Gabelbolzen kurz mit Stegbolzen und Andruckbolzen (ohne Bowdenzug / ohne Bremshalter) Andruckbolzen: ? (standard / lang)	<b>1 St.</b>
17	25 741 31	Gabelbolzen gerade kurz	2 St.
18	01 411 72	Knebelkerbstift 6x20 - DIN 1475	2 St.
19	25 741 32	Stegbolzen	2 St.
20a	25 741 33	Andruckbolzen standard für Bremse im Seitenteil (standard / 50mm)	2 St.
20b	29 711 61	Andruckbolzen lang für Bremse im Seitenteil (lang / 70mm)	2 St.
21	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
22	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380 A2	2 St.
23	04 210 11	Verschlussstopfen D15x1	2 St.
24	01 180 05	Augenschraube B M6x40 - DIN 444 vz	2 St.
25	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
26a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (=standard bei Bremse im Seitenteil)	2 St.

## Kleiderschutz für Bremse im Seitenteil siehe Kapitel 4



