

Ersatzteilkatalog

Junior2



Junior2 AR



Junior2 SLT



VD 905 - 08 / 2020

BeRollka-aktiv
Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstrasse 16
D-74889 Sinsheim

Tel.:07261 – 7351 - 0
Fax:07261 – 7351 - 10
info@berollka.de
www.berollka.de



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2020 Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

Ersatzteilkatalog

Aktiv-Kinderrollstuhl

Junior2 AR / SLT

Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellstmöglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle Berollka-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.

Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Rollstuhl oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe.

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `FM:..?.` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code, bei `FB:..?.` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `RH...`, `ST...` und `SB...` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Rollstuhltyp).

Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Rollstuhl, sowie Kundenvereinbarungen, die die instandsetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.


Ihr **BeRollKa[®]-aktiv** Team



Baugruppenübersicht

Alle unsere Rollstühle bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Rollstuhl ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.

Zum Beispiel gehören die Greifringe oder die Steckachsen zur Baugruppe RAD (= Gruppe 6).

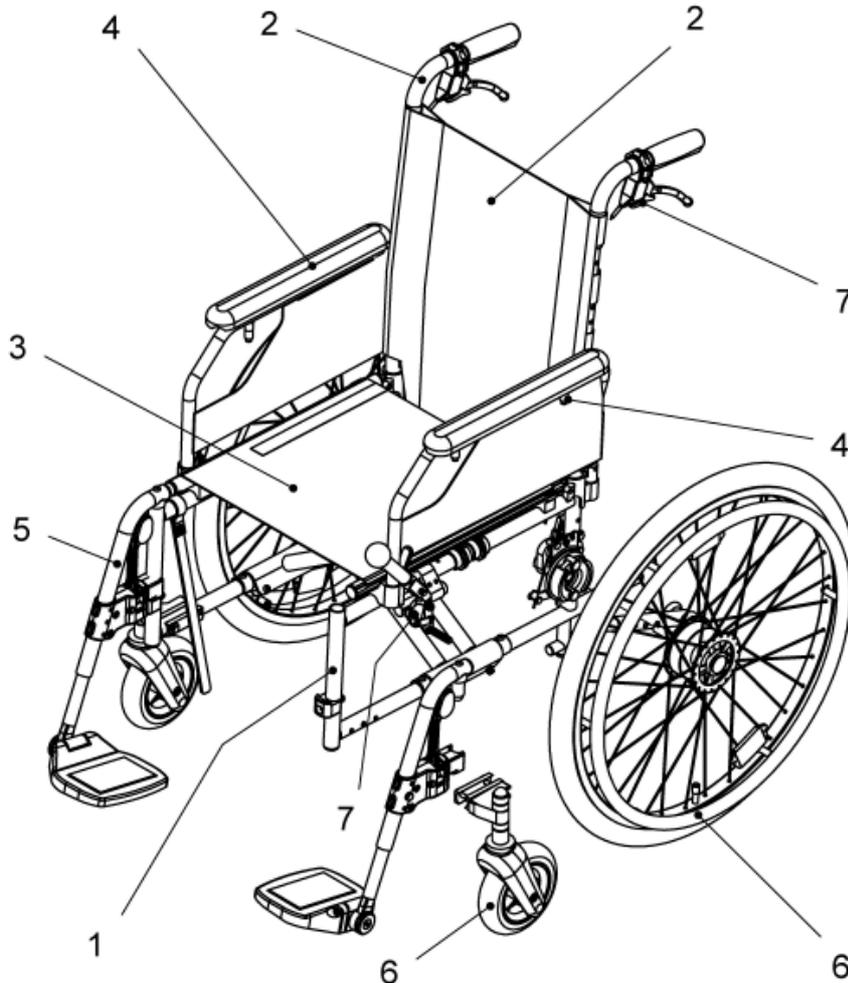

Baugruppen:

Rahmen
 Rücken
 Sitz und Kreuzstrebe
 Seitenteil

Gruppe 1
 Gruppe 2
 Gruppe 3
 Gruppe 4

Fußbrett.....
 Rad.....
 Bremse.....

Gruppe 5
 Gruppe 6
 Gruppe 7

Abkürzungen:

SB = Sitzbreite

ST = Sitztiefe

RH = Rückenhöhe

FM = Farbe der Metallteile

FB = Farbe der Bespannung

o.Bild = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.
(Download ist auf unserer Homepage www.berollka.de möglich)

Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für Berollka-aktiv Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Rollstuhles erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

Berollka-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten. Berollka-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- ◆ Beim Austausch von Teilen nur die für diesen Rollstuhl vorgesehenen Bauteile verwenden.
- ◆ Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- ◆ Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Rollstuhl durchführen.
- ◆ Führen Sie nach der Reparatur des Rollstuhls eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und Fahrverhalten. Prüfen Sie die **Bremsfähigkeit**, die **Lenkfähigkeit** und den **Geradeauslauf**.
- ◆ Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit den Rollstuhl dem Patienten übergeben.

Anzugsdrehmomente Schrauben:


- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm
- M16 (Mutter Bremsträger/Steckachsenadapter) = 30Nm
- M20 (Mutter Adapter Steckachse FINDUS) = 30Nm

Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben




Rahmen

Gruppe 1

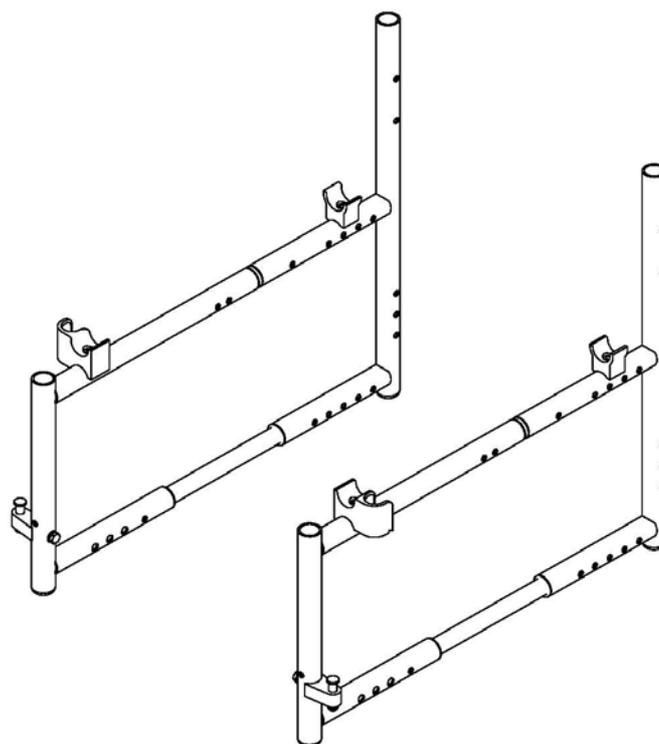


Rahmenteile vorne JUNIOR2 AR (Sprint Kiddy)
(SPRINT-Verriegelung)

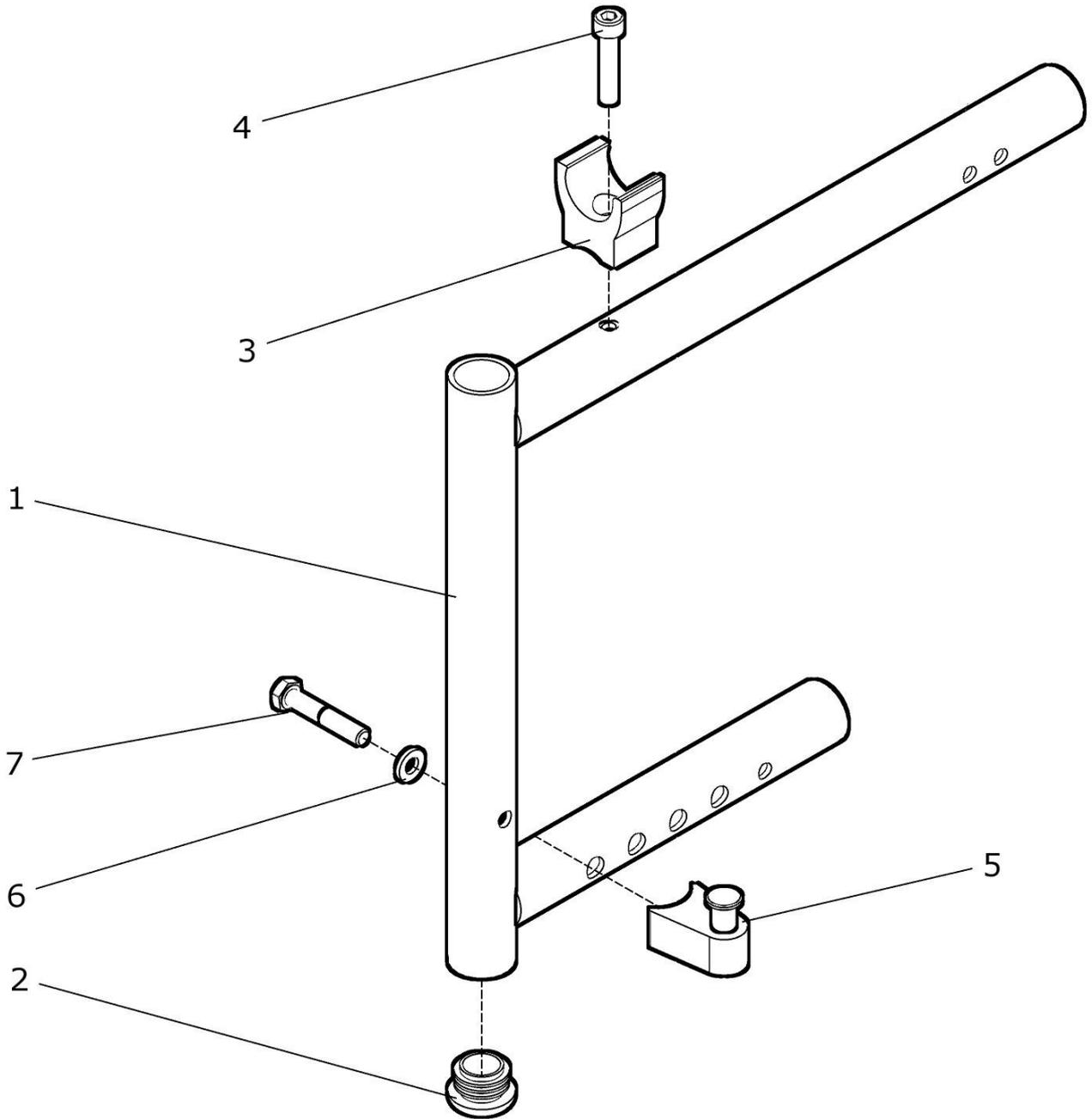


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	22 118 10	Rahmenteile vorne rechts / links JUNIOR2 AR ST 36/38 kpl. FM: ?	1 Paar
1b – 7	22 118 15	Rahmenteile vorne rechts / links JUNIOR2 AR ST 26-34 kpl. FM: ?	1 Paar
1a – 7	22 118 12	Rahmenteil vorne rechts JUNIOR2 AR ST 36/38 kpl. FM: ?	1 St.
1b – 7	22 118 16	Rahmenteil vorne rechts JUNIOR2 AR ST 26-34 kpl. FM: ?	1 St.
1a – 7	22 118 13	Rahmenteil vorne links JUNIOR2 AR ST 36/38 kpl. FM: ?	1 St.
1b – 7	22 118 17	Rahmenteil vorne links JUNIOR2 AR ST 26-34 kpl. FM: ?	1 St.
1a	22 118 01	Rahmenteil vorne JUNIOR2 AR ST 36/38 (rechts / links) FM: ?	2 St.
1b	22 118 02	Rahmenteil vorne JUNIOR2 AR ST 26-34 (rechts / links) FM: ?	2 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2mm	2 St.
3	50 121 01	Auflager Seitenteil rechts / links verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
4	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
5 – 7	50 111 00	Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl. mit Schraube und Scheibe	2 St.
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.

Rahmenteile Abduktion vorne JUNIOR2 AR (Sprint Kiddy)
(SPRINT-Verriegelung)

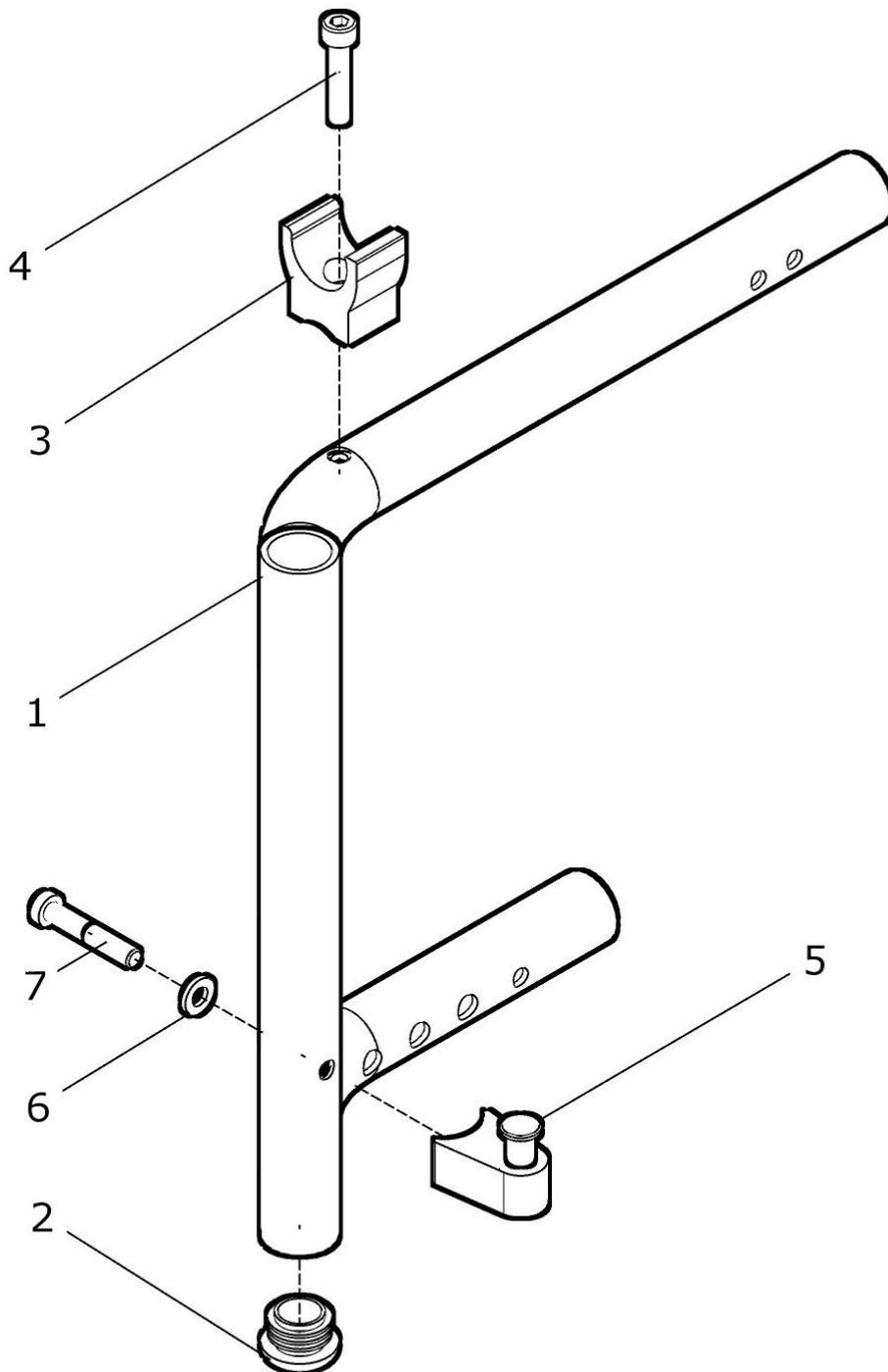


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	22 119 00	Rahmenteile Abduktion vorne rechts / links JUNIOR2 AR für ST 36 / 38 FM: ?	1 Paar
1b – 7	22 119 05	Rahmenteile Abduktion vorne rechts / links JUNIOR2 AR für ST 26 - 34 FM: ?	1 Paar
1a – 7	22 119 20	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 AR ST 36/38 FM: ?	1 St.
1b – 7	22 119 25	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 AR ST 26-34 FM: ?	1 St.
1a – 7	22 119 30	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 AR ST 36/38 FM: ?	1 St.
1b – 7	22 119 35	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 AR ST 26-34 FM: ?	1 St.
1a	22 119 21	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 AR ST 36/38 FM: ?	1 St.
1b	22 119 26	Rahmenteil Abduktion vorne rechts kurz JUNIOR2 AR ST 26-34 FM: ?	1 St.
1c	22 119 31	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 AR ST 36/38 FM: ?	1 St.
1d	22 119 36	Rahmenteil Abduktion vorne links kurz JUNIOR2 AR ST 26-34 FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschlusstopfen 23x2mm	2 St.
3	50 121 01	Auflager Seitenteil rechts / links verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St.
4	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
5 – 7	50 111 00	Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl. mit Schraube und Scheibe	2 St.
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.

Rahmenteile vorne JUNIOR2 SLT

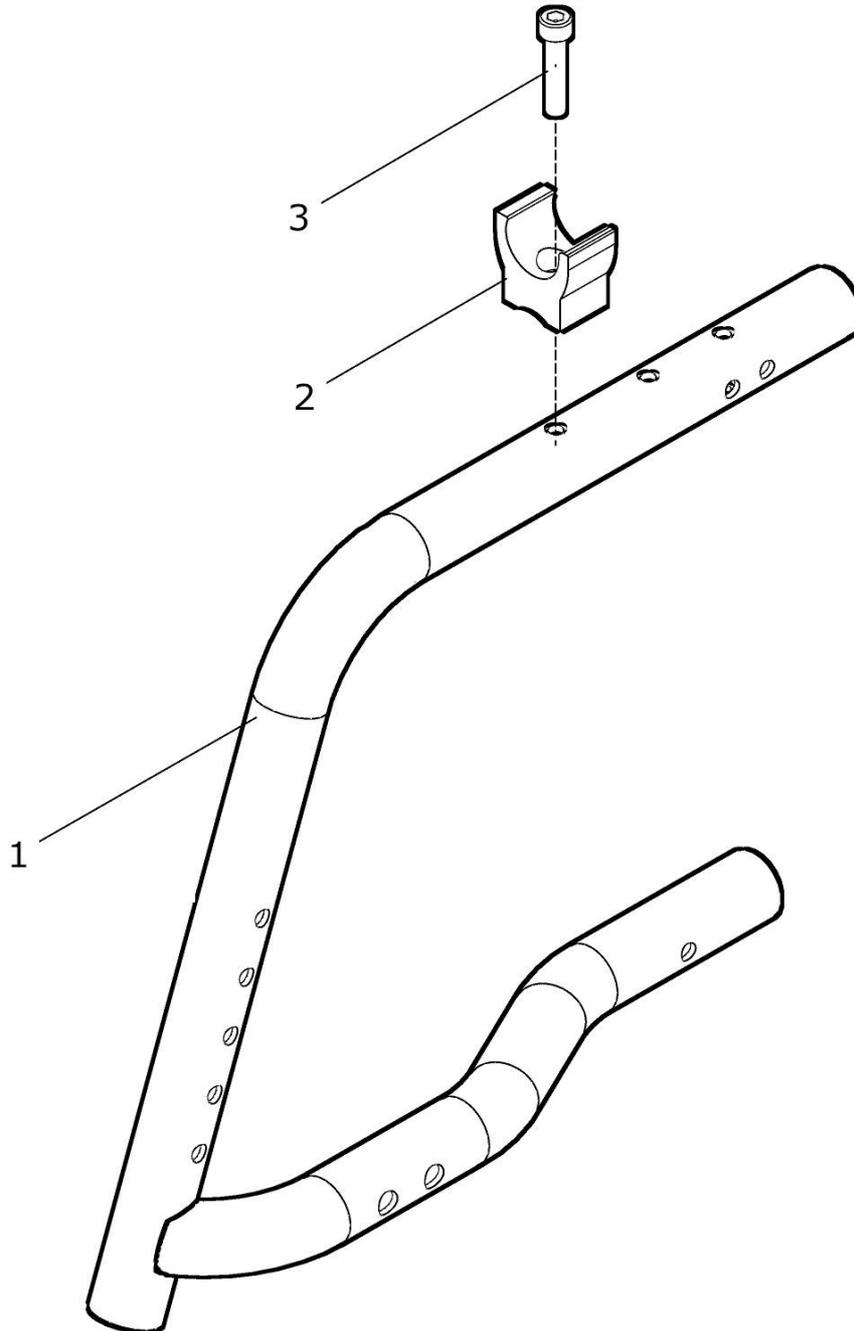


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	22 114 00	Rahmenteile vorne (70° gebogen) JUNIOR2 SLT kpl. rechtes und linkes Rahmenteil FM: ?	1 Paar
1a - 3	22 114 20	Rahmenteil vorne (70° gebogen) rechts JUNIOR2 SLT kpl. FM: ?	1 St.
1b - 3	22 114 30	Rahmenteil vorne (70° gebogen) links JUNIOR2 SLT kpl. FM: ?	1 St.
1a	22 114 21	Rahmenteil vorne (70° gebogen) rechts JUNIOR2 SLT FM: ?	1 St.
1b	22 114 31	Rahmenteil vorne (70° gebogen) links JUNIOR2 SLT FM: ?	1 St.
2	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.

Rahmenteil vorne Abduktion JUNIOR2 SLT

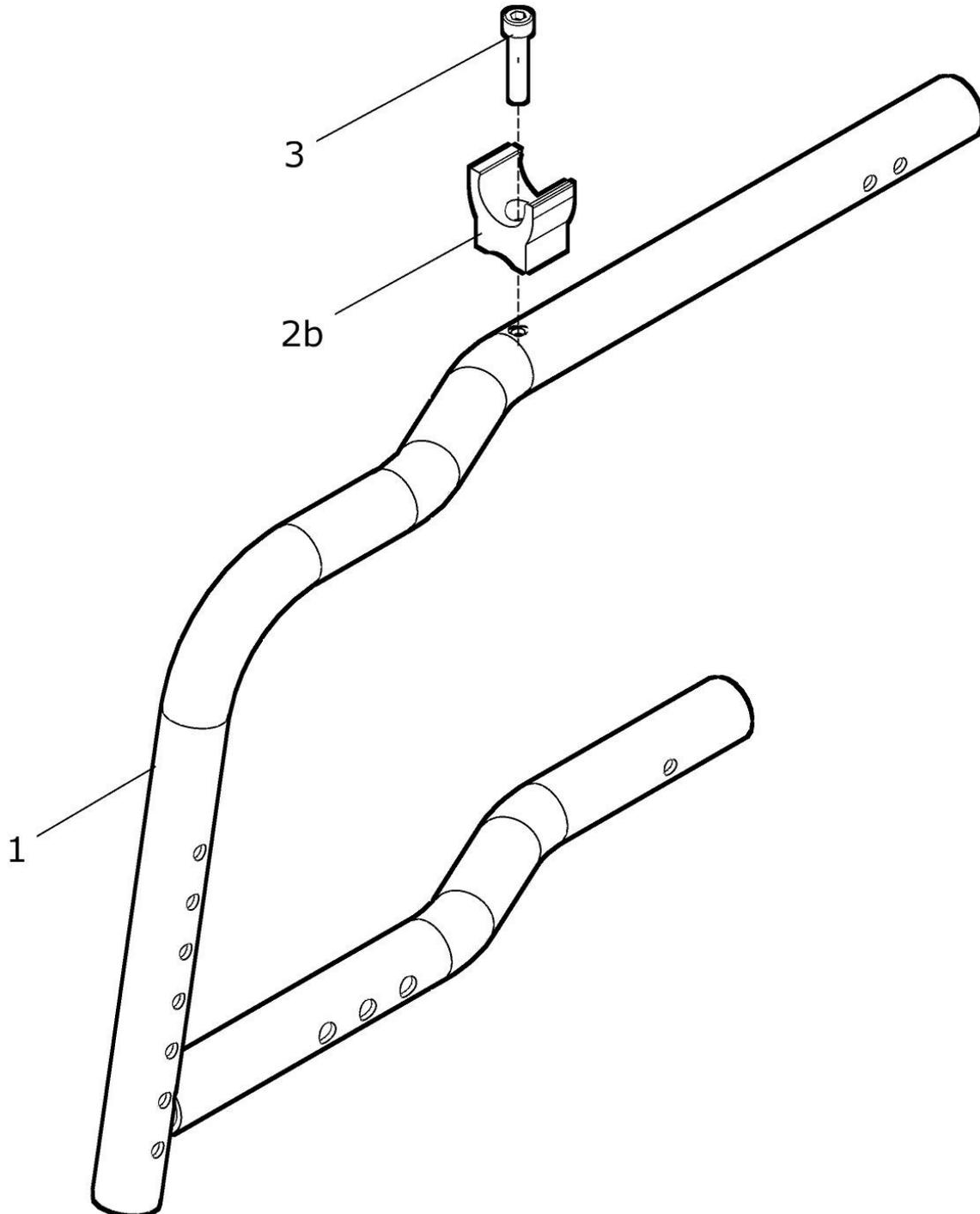

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	22 114 50	Rahmenteile Abduktion vorne rechtes und linkes Rahmenteil JUNIOR2 SLT ST 26-32 kpl. FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 114 55	Rahmenteile Abduktion vorne rechtes und linkes Rahmenteil JUNIOR2 SLT ST 34-38 kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 3	22 114 60	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 SLT ST 26-32 kpl. FM: ?	1 St.
1b - 3	22 114 65	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 SLT ST 34-38 kpl. FM: ?	1 St.
1c - 3	22 114 70	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 SLT ST 26-32 kpl. FM: ?	1 St.
1d - 3	22 114 75	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 SLT ST 34-38 kpl. FM: ?	1 St.
1a	22 114 61	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 SLT ST 26-32 FM: ?	1 St.
1b	22 114 66	Rahmenteil Abduktion vorne rechts JUNIOR2 SLT ST 34-38 FM: ?	1 St.
1c	22 114 71	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 SLT ST 26-32 FM: ?	1 St.
1d	22 114 76	Rahmenteil Abduktion vorne links JUNIOR2 SLT ST 34-38 FM: ?	1 St.
2	50 121 01	Auflager Seitenteil links / rechts verwendbar (für Kleiderschutz)	2 St
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.


Verbindungsrohre Rahmen JUNIOR2

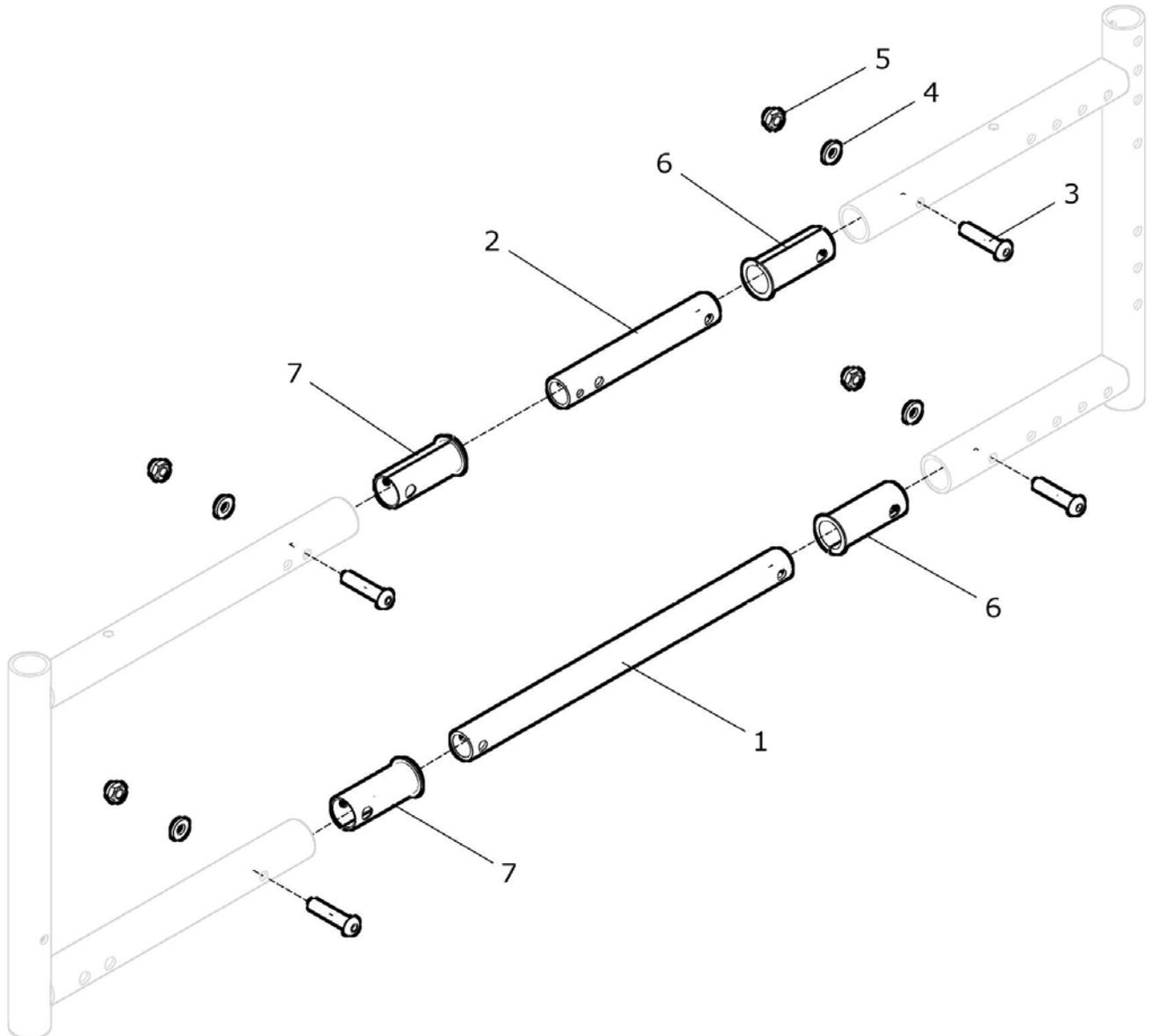

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	22 101 00	Verbindungsteile Rahmen JUNIOR2 kpl. 1 Satz = für einen Rollstuhl	1 Satz
1	22 101 01	Verbindungsrohr unten JUNIOR2	2 St.
2	22 101 02	Verbindungsrohr oben JUNIOR2	2 St.
3	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	8 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	8 St.
6	22 102 01	Buchse lang JUNIOR2	4 St.
7	50 321 16	Buchse lang	4 St.

Rahmenteil hinten JUNIOR2

(für Rücken standard oder Rücken mit Schiebegriff höhenverstellbar)

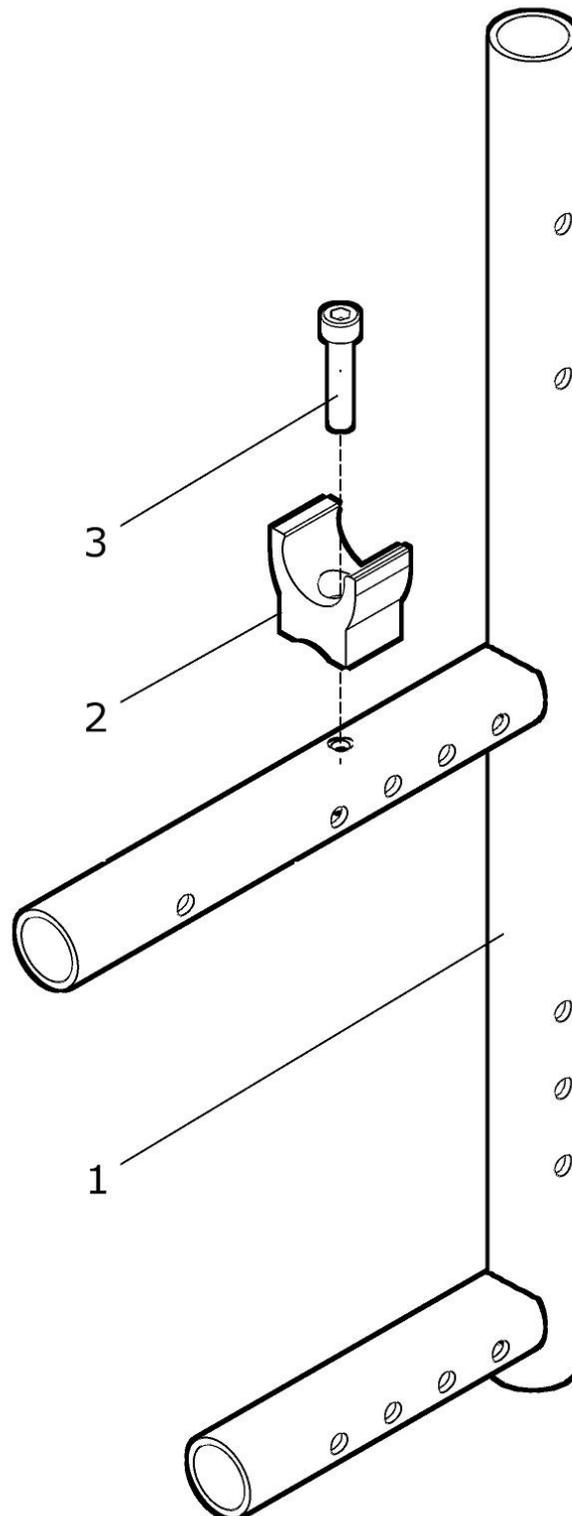


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	22 120 00	Rahmenteile hinten kurz JUNIOR2 (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1 – 3	22 122 00	Rahmenteil hinten kurz rechts JUNIOR2 kpl. FM: ?	1 St.
1 – 3	22 123 00	Rahmenteil hinten kurz links JUNIOR2 kpl. FM: ?	1 St.
1	22 122 01	Rahmenteil hinten kurz JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	22 120 06	Rahmenteile hinten +30mm kurz JUNIOR2 (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1	22 122 06	Rahmenteil hinten +30mm kurz JUNIOR2 (rechts/links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.

Sonder-Rahmenteil:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	22 122 41	Rahmenteil hinten kurz ## Stahl ## JUNIOR2 (rechts/links verwendbar) FM: ?	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (mit Griff) JUNIOR2

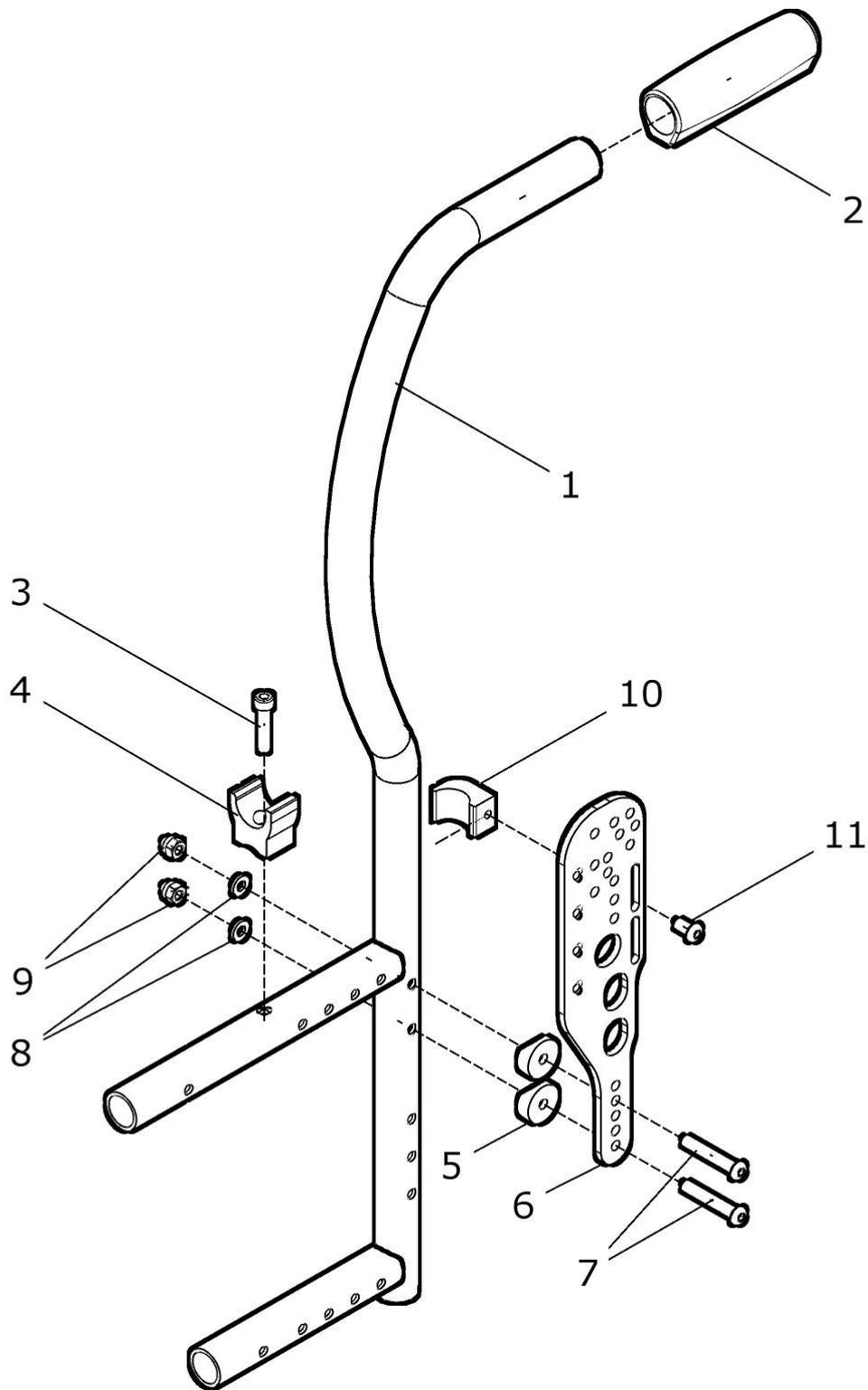


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	22 130 50	Rahmenteile hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 kpl. rechtes und linkes Rahmenteil RH: ? FM: ?	1 Paar
1 - 4	22 132 50	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 rechts kpl. RH: ? FM: ?	1 St.
1 - 4	22 133 50	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 links kpl. RH: ? FM: ?	1 St.
1a	22 132 52	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 RH 35 FM: ?	2 St.
1b	22 132 53	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 RH 40 FM: ?	2 St.
2	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4	50 121 01	Auflager	2 St.
5 – 11	40 401 10	Aufnahme für Kleiderschutz kpl. (nur für Kleiderschutz)	1 Satz
5	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
6	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ??	2 St.
7	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
8	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
9	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
10	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
11	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (für Schiebegriffe höhenverstellbar) JUNIOR2

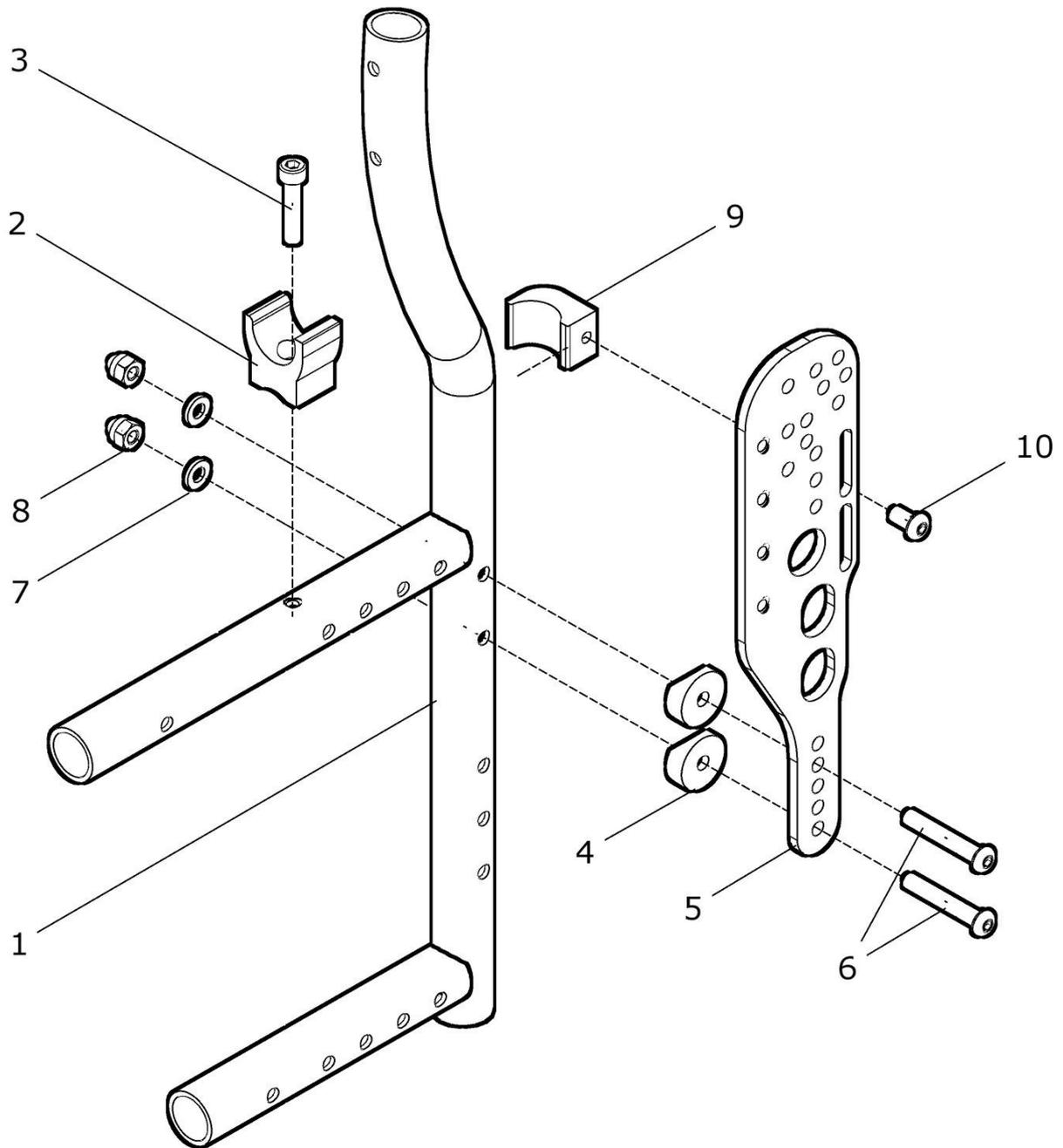

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	22 130 00	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar Rahmenteile rechts und links RH: ? FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 132 00	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 rechts kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? FM: ?	1 St.
1 - 3	22 133 00	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 links kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? FM: ?	1 St.
1a	22 132 02	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 35 Schiebegr. höhenv. JUNIOR2 für Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
1b	22 132 03	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 40 Schiebegr. höhenv. JUNIOR2 für Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4 – 10	40 401 10	Aufnahme für Kleiderschutz kpl. (nur für Kleiderschutz)	1 Satz
4	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
5	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ??	2 St.
6	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
7	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
9	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
10	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil / Rücken 30° mit Gasdruckfeder JUNIOR2

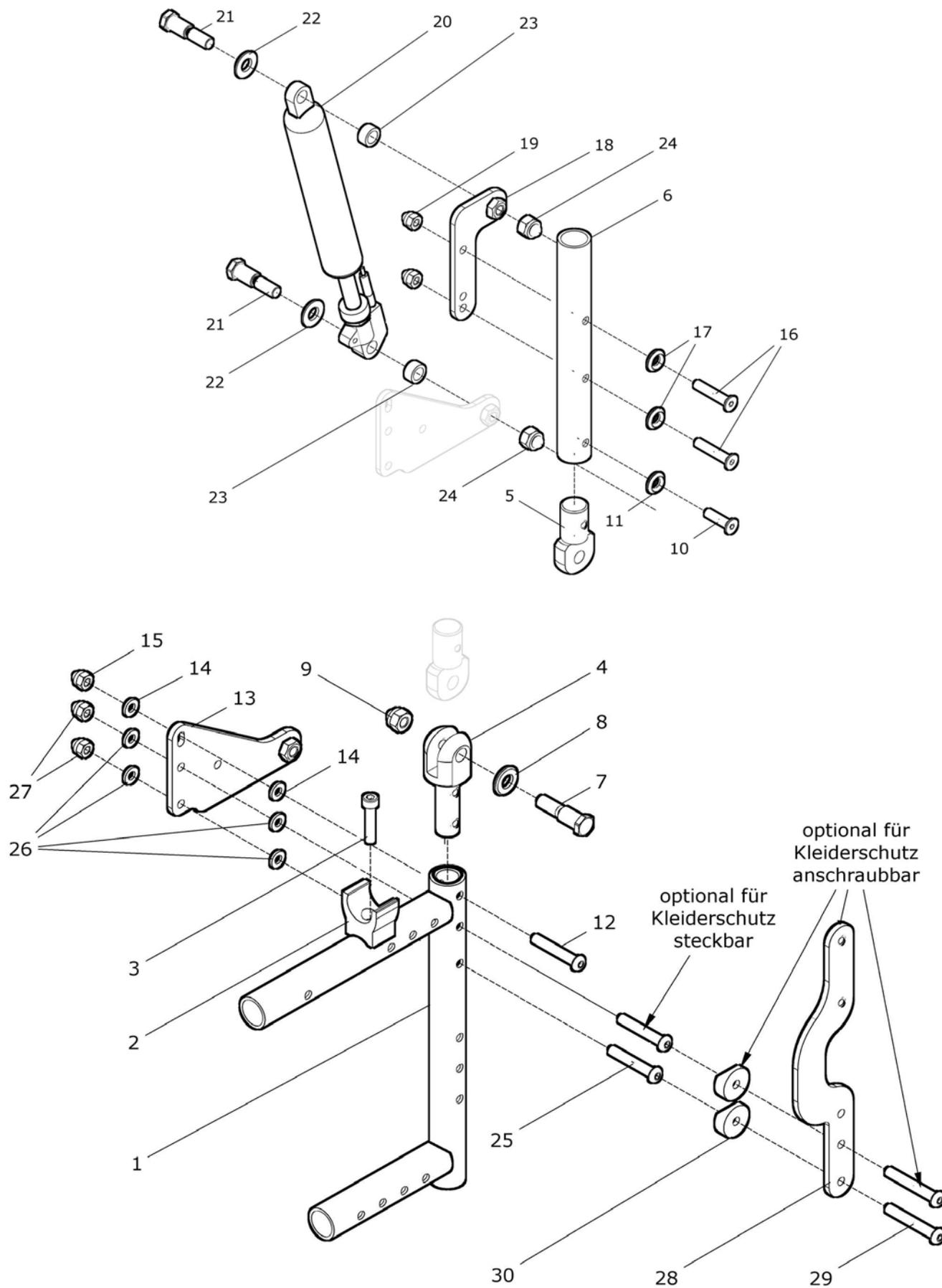

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 24	22 260 00	Rücken/Rahmen 30° winkerverst. Gasdruckfeder JUNIOR2 kpl. mit Gasdruckfeder, Grundplatten und Halteplatten (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) ab RH 30cm möglich FM: ?	1 Paar
1a - 12	22 120 15	Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts und links JUNIOR2 kpl. mit 30°-Rückengelenk FM: ?	1 Paar
1a - 3	22 122 15	Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts JUNIOR2 kpl. mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1a - 3	22 123 15	Rahmenteile hinten 30°-Rücken links JUNIOR2 kpl. mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1a	22 122 16	Rahmenteil hinten 30°-Rücken (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6	50 122 07	Rahmen / Rückenrohr für 30°-Rücken Aufnahmerohr für Rückenrohr; schwarz	2 St.
7	50 261 03	Passschraube für Gelenk 30°-Rücken	2 St.
8	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
9	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	2 St.
10	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	2 St.
11	01 350 04	Rosette - 8,4	2 St.
12	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	2 St.
13 - 24	50 261 10	Gasdruckfedern 30°-Rücken mit Halterung kpl. mit Grundplatten und Halteblechen	1 Paar
13a	50 261 21	Grundplatte rechts für Gasfeder	1 St.
13b	50 261 31	Grundplatte links für Gasfeder	1 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
16	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
17	01 350 04	Rosette - 8,4	4 St.
18a	50 261 22	Halteblech oben rechts für Gasfeder	1 St.
18b	50 261 32	Halteblech oben links für Gasfeder	1 St.
19	01 210 03	Mutter M6 - DIN 986 A2	4 St.
20	50 261 60	Gasdruckfeder mit Auslösekopf kpl.	2 St.

21	50 261 03	Passschraube für 30°-Rücken	4 St.
22	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	4 St.
23	50 261 04	Buchse 7mm	4 St.
24	01 210 84	Hutmutter - M8 - DIN 986	4 St.
25 – 27	40 401 30	Halterung für Kleiderschutz steckbar kpl.	2 Set
25	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
26	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
27	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
26 – 30	40 401 50	Halterung für Kleiderschutz anschraubbar kpl.	2 Set
26	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
27	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
28	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade (bei Kleiderschutz)	2 St.
29	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
30	50 321 11	KU-Halbschale - 6,2	4 St.

A – C o. Bild	50 261 45	Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl. RH: ? Rückenrohr: ?	2 Set
A1	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken bis RH40 stand.	2 St.
A2	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
A3	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
B	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.
C	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.


**Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -
Rückenrohre RH -5cm wählen !!!!!**

Rückenbespannung siehe Kapitel 2 (50 261 50 / 50 261 55 / 50 264 00)

Rahmenteil hinten +30mm

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1b - 24	22 260 03	Rücken/Rahmen 30° winkerver. Gasfeder / +30mm JUNIOR2 kpl. Rücken/Rahmenteil +30mm und mit Gasdruckfeder, Grundplatten und Halteplatten und Rückenaufnehmerohr (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) ab RH 30cm möglich FM: ?	1 Paar
1b	22 122 26	Rahmenteil hinten 30°-Rücken und +30mm nach hinten versetzt (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment - Rücken gerade - JUNIOR2

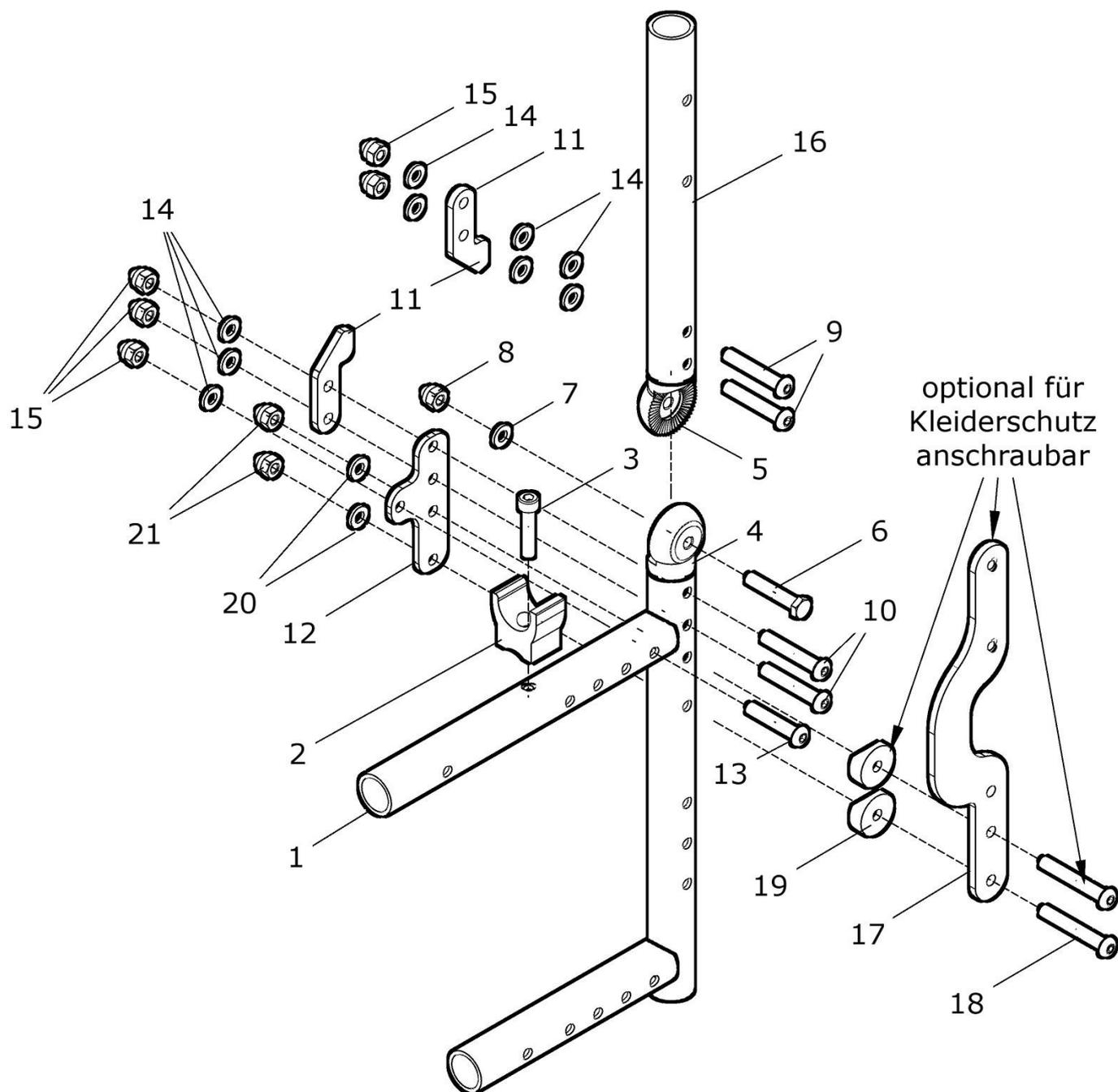

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	22 152 80	Rahmenteile hinten rechts und links mit Zahnsegmente-Gelenk und mit Rückenrohraufnahme für Rücken gerade JUNIOR2 kpl. für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 - 21	22 152 82	Rahmenteil hinten rechts mit Zahnsegmente-Gelenk JUNIOR2 kpl. und mit Rückenrohraufnahme gerade für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 - 21	22 152 83	Rahmenteil hinten links mit Zahnsegmente-Gelenk JUNIOR2 kpl. und mit Rückenrohraufnahme gerade für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 - 3	22 152 00	Rahmenteile hinten rechts + links f. Zahnsegment-Rücken J2 kpl. für Zahnsegment-Rücken gerade (ohne Gelenk) FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 152 20	Rahmenteil hinten rechts für Zahnsegment-Rücken gerade J2 kpl. (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1 - 3	22 152 30	Rahmenteil hinten links für Zahnsegment-Rücken gerade J2 kpl. (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1	22 152 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken gerade JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 - 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken mit Zahnsegment re. und li. JUNIOR2 für rechts und links (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.

10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16	50 271 21	Rückenrohraufnahme für Rücken gerade mit Zahnsegment	2 St.
17 – 21	40 401 50	Halterung Kleiderschutz anschraubbar für Rücken gerade kpl.	2 Set
17	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade	2 St.
18	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
19	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.


Umbausatz - Rahmenteile mit Rückenrohre komplett:

o. Bild	22 152 90	Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohr mit Griff vormontiert (ohne Rückenbespannung) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz /anschraubbar oder steckbar) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	1 Satz
---------	-----------	---	--------

o. Bild	22 152 95	Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar vormontiert (ohne Rückenbespannung) (ohne Schiebegriffhalter / ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz anschraubbar oder steckbar) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	1 Satz
---------	-----------	---	--------


**Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -
Rückenrohre RH -10cm wählen !!!!!**

Gelenksatz mit Klemmhebel - Rücken gerade - mit Zahnsegment JUNIOR2

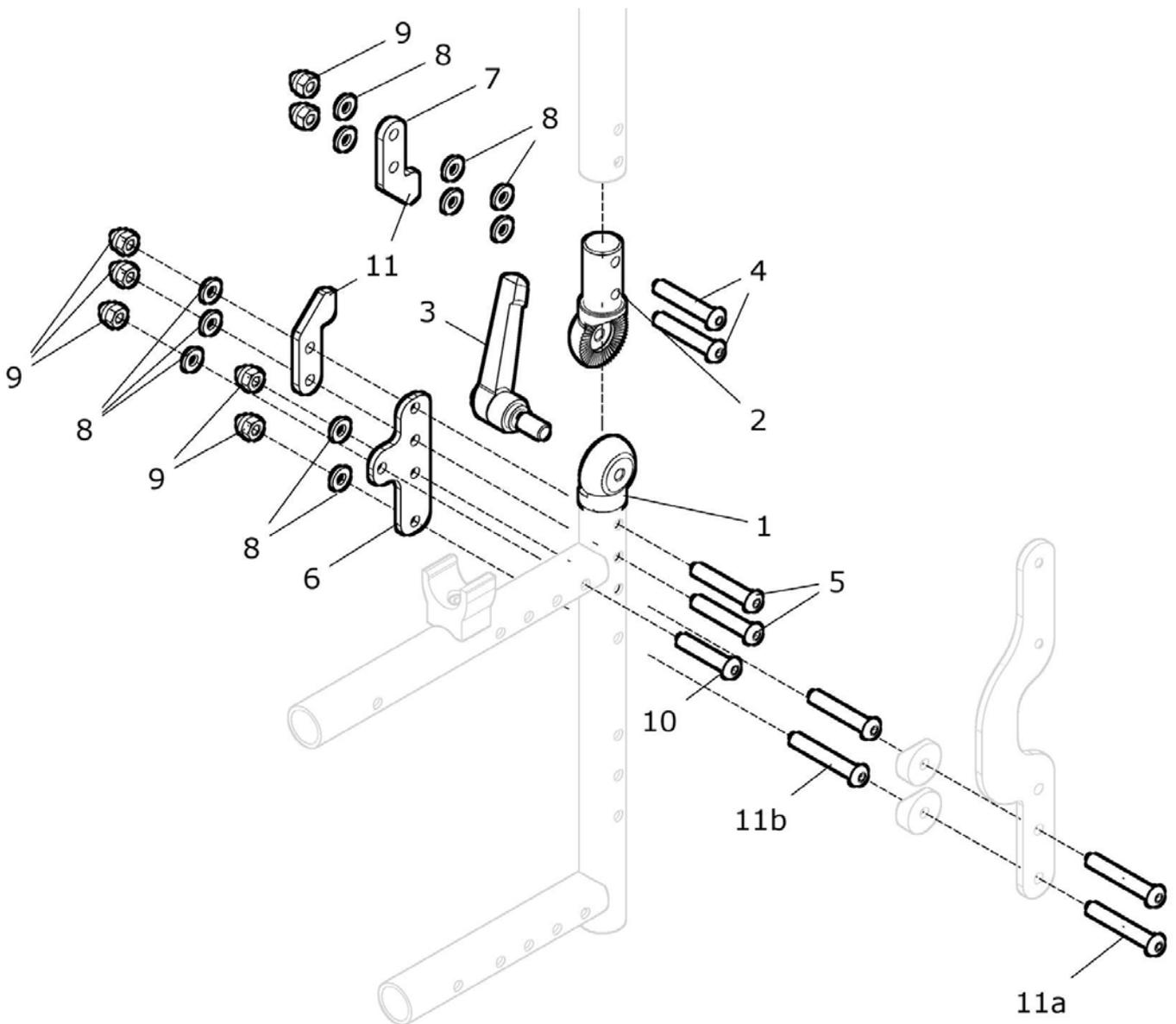

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	22 262 50	Gelenksatz mit Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnseg. rechts und links, für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
1a, 2a, 3 - 11	22 262 52	Rückengelenk-Set rechts Zahnsegment/Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 kpl. (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
1b, 2b, 3 - 11	22 262 53	Rückengelenk-Set links Zahnsegment/Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 kpl. (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
1a	40 261 61	Gelenk unten rechts M8 für Klemmhebel	1 St.
1b	40 261 71	Gelenk unten links ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2a	40 261 62	Gelenk oben rechts Ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2b	40 261 72	Gelenk oben links M8 für Klemmhebel	1 St.
3	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
4	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.
5	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	2 St.
6	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
7	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
8	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	22 St.
9	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	14 St.
10	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
11a	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 bei Kleiderschutz anschraubbar	4 St.
11b	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380 bei Kleiderschutz steckbar	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken mit Griff JUNIOR2

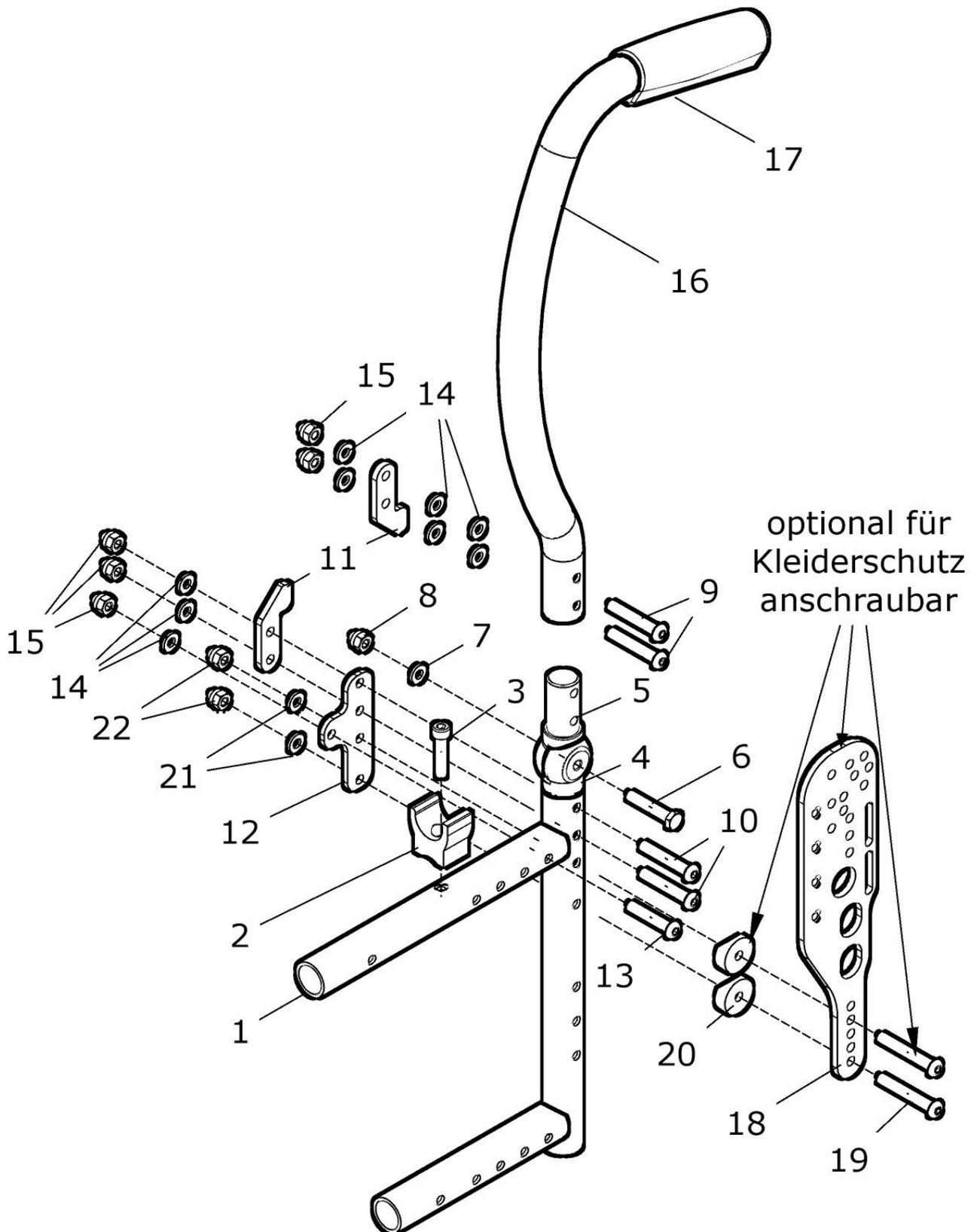


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 142 80	Rahmenteile hinten re./li. mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 rechts und links RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 17	22 142 82	Rahmenteil hinten rechts mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 17	22 142 83	Rahmenteil hinten links mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 00	Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment rechts und links JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 3	22 142 20	Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 30	Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1	22 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment für rechts und links JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.
10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.

12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16	40 261 22	Rückenrohr UNITOMIC für Zahnsegment mit Griff RH 40 FM: ?	2 St.
17	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
18 – 22	40 401 40	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.	1 Satz
18	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC	2 St.
19	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
20	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
21	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
22	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment und UNITOMIC Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar


JUNIOR2

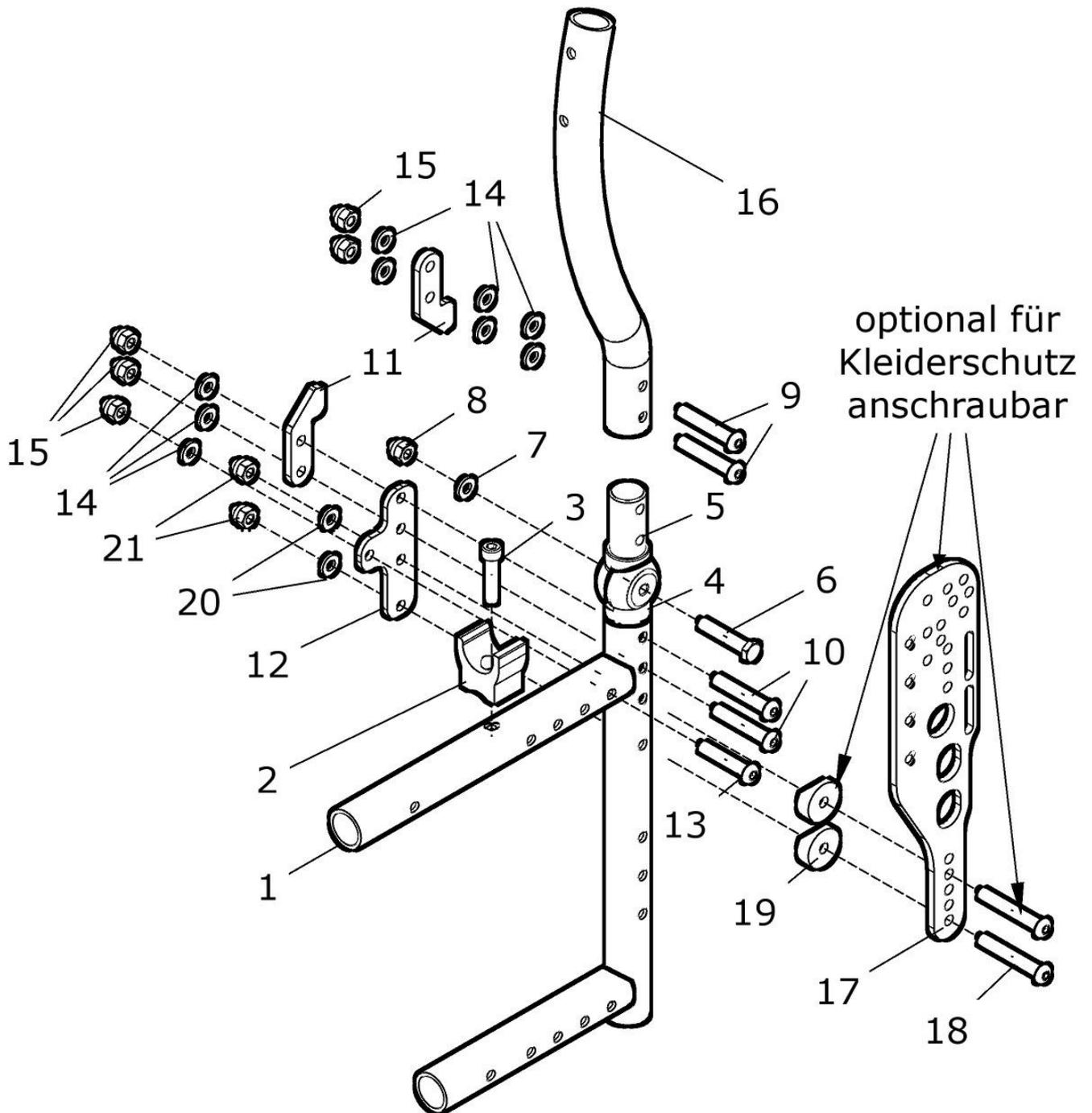

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 16	22 142 90	Rahmenteile hinten re./li. mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 16	22 142 92	Rahmenteile hinten rechts mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 16	22 142 93	Rahmenteile hinten links mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 00	Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment rechts und links; JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 3	22 142 20	Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 30	Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1	22 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment JUNIOR2 für rechts und links (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.

10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16a	40 262 21	Rückenrohr UNITOMIC RH 35 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
16b	40 262 22	Rückenrohr UNITOMIC RH 40 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
17 – 21	40 401 40	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.	1 Satz
17	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC	2 St.
18	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
19	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.

Rahmenteil / Rücken 30° - mechanisch winkelverstellbar- JUNIOR2

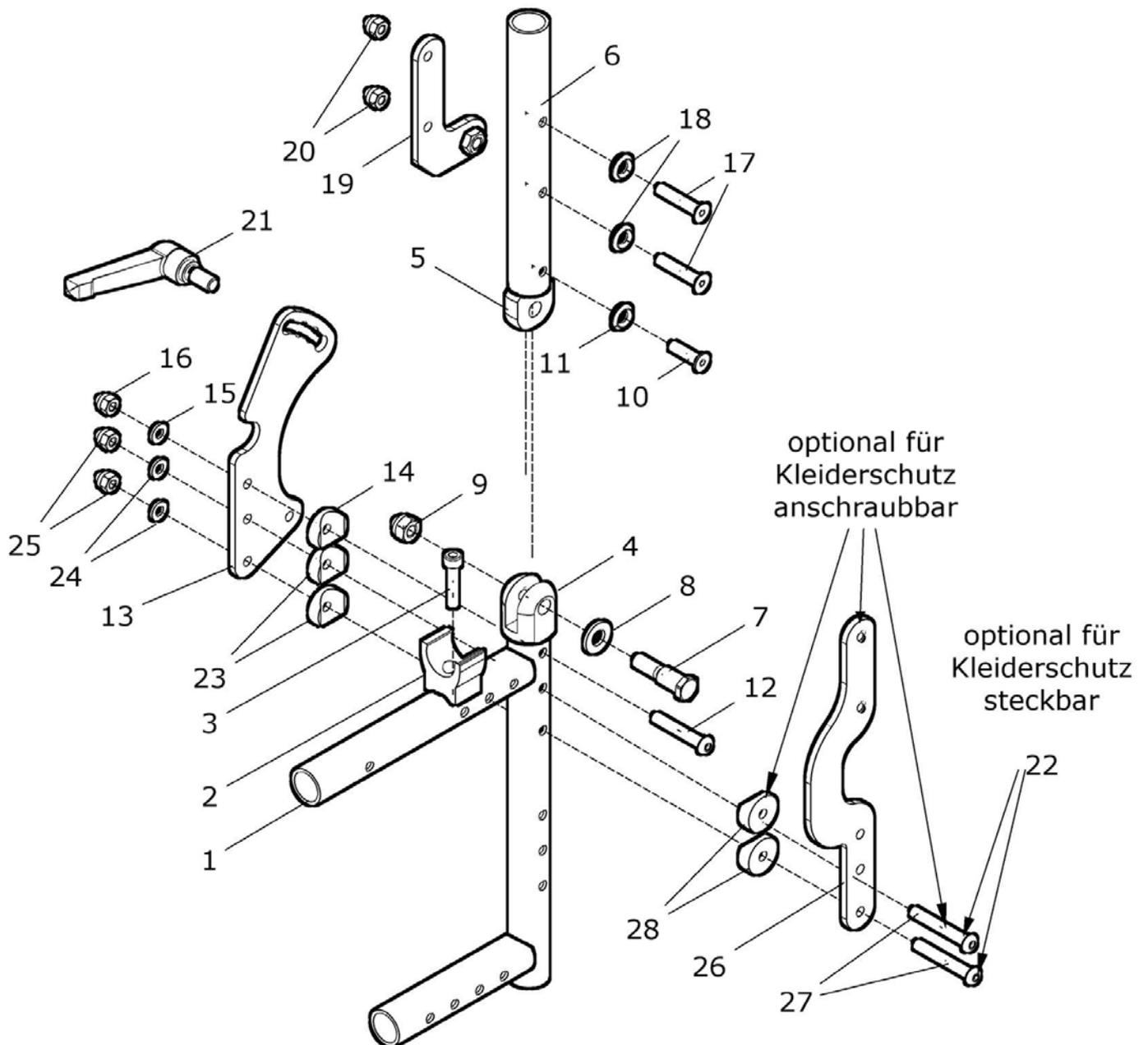


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	22 260 06	Rücken/Rahmen 30°-Rücken mechanisch JUNIOR2 kpl. mit Gelenkplatte und Halteblechen (ohne Rückenrohre und ohne Rückenbespannung) FM: ?	1 Paar
1 - 12	22 120 15	Rahmenteile hinten 30°-Rücken rechts und links JUNIOR2 kpl. mit 30°-Rückengelenk FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 122 15	Rahmenteil hinten 30°-Rücken rechts JUNIOR2 kpl. mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1 - 3	22 123 15	Rahmenteil hinten 30°-Rücken links JUNIOR2 kpl. mit Auflager (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1	22 122 16	Rahmenteil hinten 30°-Rücken (rechts / links verwendbar) JUNIOR2 FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	50 261 01	Gabelkopf für 30°-Rückengelenk	2 St.
5	50 261 02	Gelenkstück für 30°-Rückengelenk	2 St.
6	50 122 07	Rahmen / Rückenrohr für 30°-Rücken Aufnahmerohr für Rückenrohr, schwarz	2 St.
7	50 261 03	Passschraube für Gelenk 30°-Rücken	2 St.
8	01 320 04	Scheibe - 10,5 - DIN 125	2 St.
9	01 210 34	Sechskantmutter - M8 - DIN 985	2 St.
10	01 120 13	Senkschraube - M6x25 – DIN 7991	2 St.
11	01 350 04	Rosette 8,4	2 St.
12	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	2 St.
13 - 25	50 262 10	Halterung 30°-Rücken mechanisch kpl. mit Gelenkplatte und Halteblechen	1 Paar
13	50 262 01	Gelenkplatte Rücken 30° mechanisch (rechts / links verwendbar)	2 St.
14	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
15	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
17	01 120 15	Senkschraube - M6x35 - DIN 7991	4 St.
18	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
19a	50 262 21	Halteblech oben rechts 30° mechanisch	1 St.
19b	50 262 31	Halteblech oben links 30° mechanisch	1 St.
20	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985 A2	4 St.
21	50 262 22	Klemmhebel M8x15 bearbeitet für 30°-Rücken mechanisch	2 St.

22 – 25	22 262 80	Halterung für Kleiderschutz steckbar kpl.	2 Set
22	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
23	50 321 11	Halbschale - 6,2	4 St.
24	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
25	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
23 – 28	50 262 80	Halterung für Kleiderschutz anschraubbar kpl.	2 Set
23	50 321 11	Halbschale - 6,2	4 St.
24	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
25	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.
26	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade (bei Kleiderschutz)	2 St.
27	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
28	50 321 11	Halbschale - 6,2	4 St.

**Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -
Rückenrohre RH -5cm wählen !!!!!**


Rückenbespannung siehe Kapitel 2 (50 262 50 / 50 264 00)

Kippsicherung abgekröpft

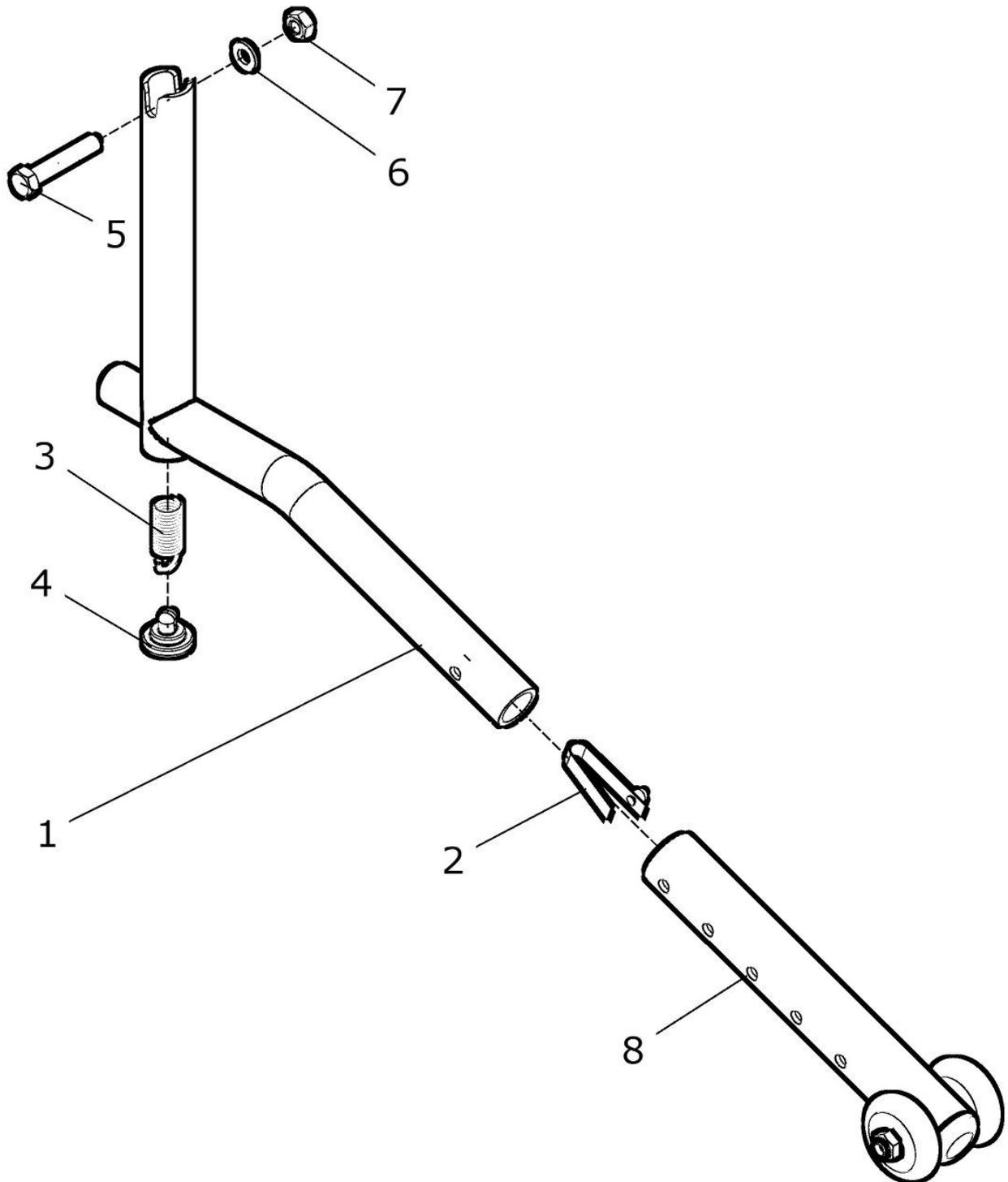


Pos+. -Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8	50 190 00	Kippsicherung abgekröpft abschwenkbar kpl.	1 St.
1 - 7	50 192 00	Kippsicherungsadapter abgekröpft kpl.	1 St.
1	50 192 01	Kippsicherungsadapter abgekröpft	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 - 7	50 190 10	Montagesatz Kippsicherung kpl.	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.

Kippsicherung gerade

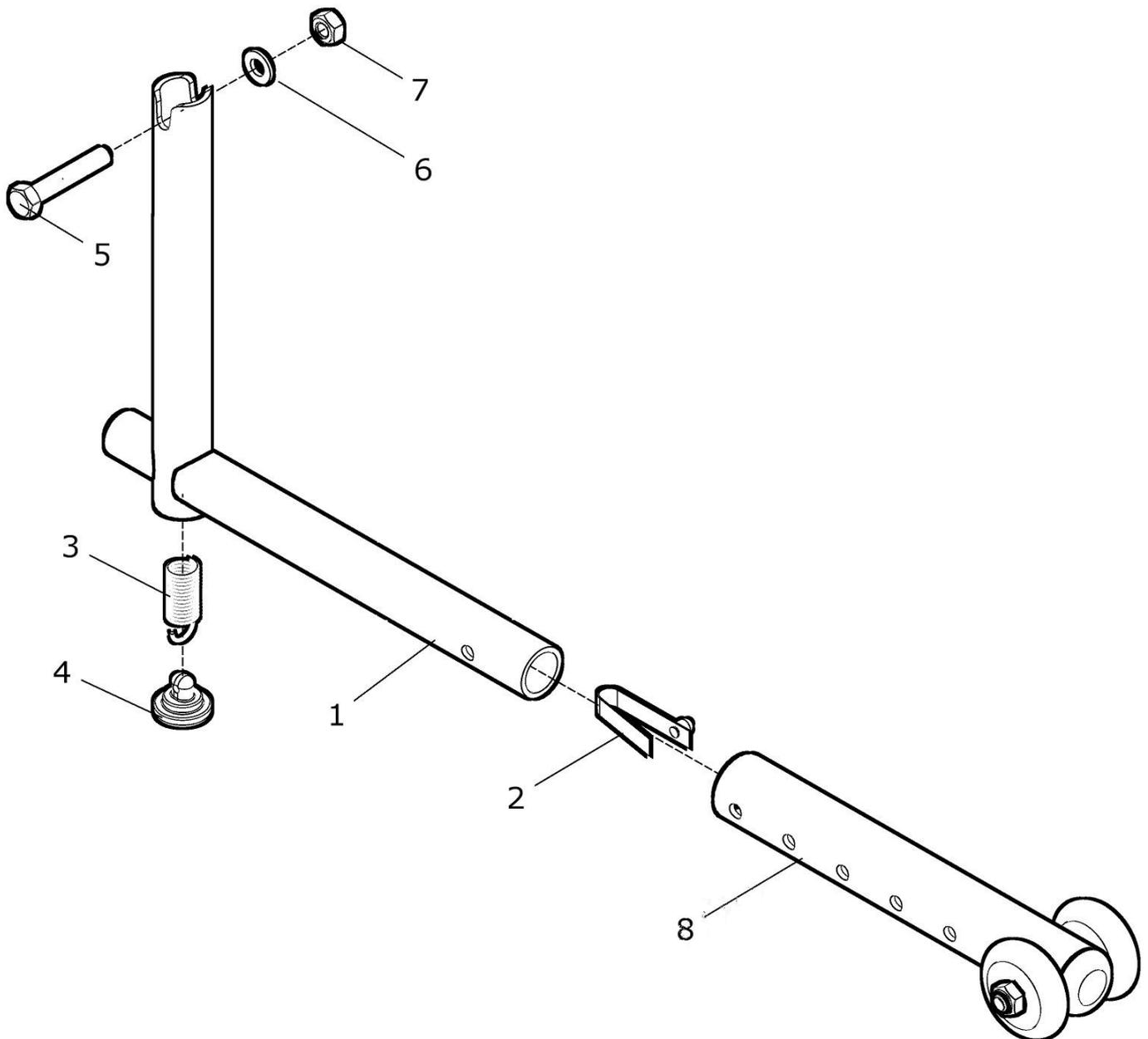


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	30 190 50	Kippsicherung gerade abschwenkbar kpl.	1 St.
1 – 7	30 192 50	Kippsicherungsadapter gerade kpl.	1 St.
1	30 192 52	Kippsicherungsadapter gerade	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 – 7	50 190 10	Montagesatz Kippsicherung kpl.	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.

Ankippbügel

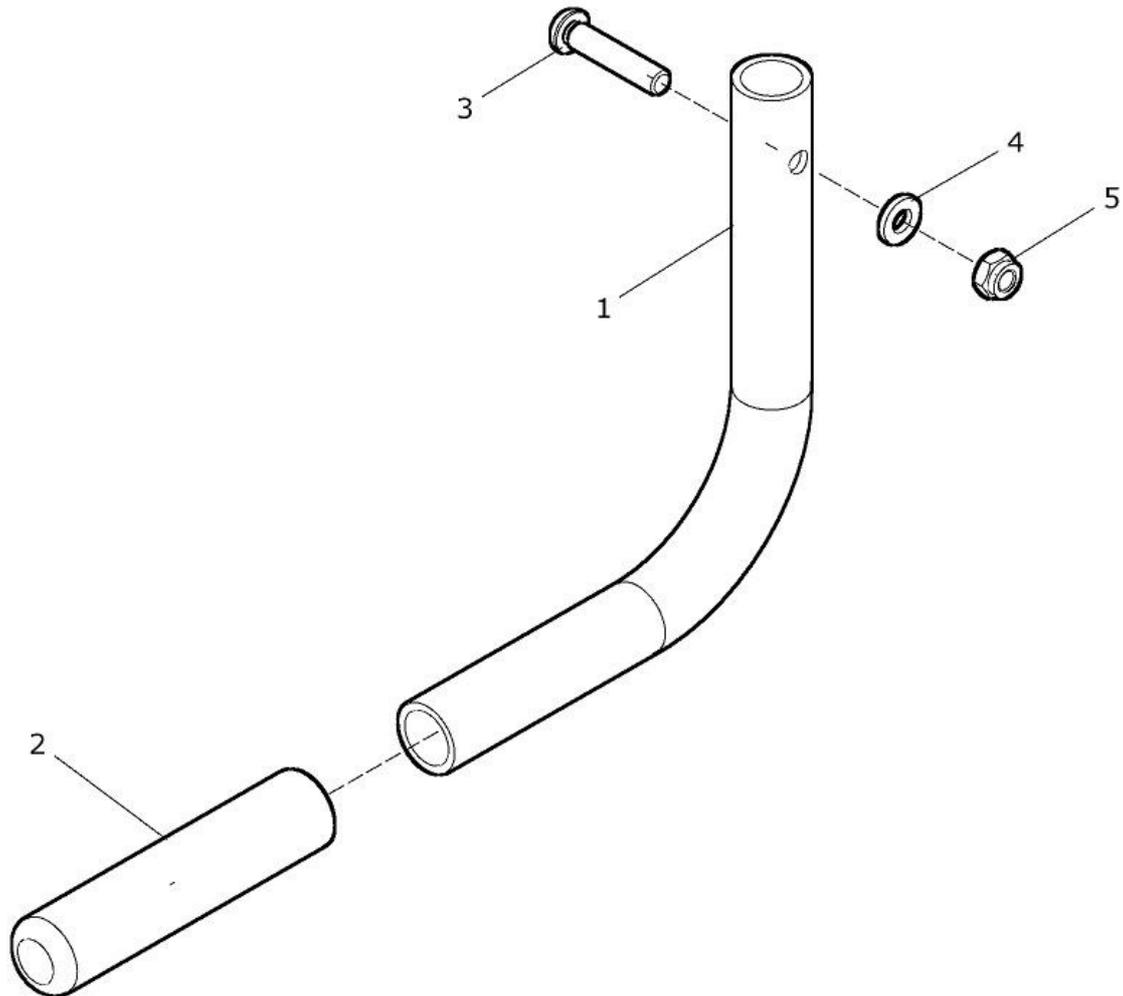


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	50 170 00	Ankippbügel kpl.	1 St.
1	50 172 01	Ankippbügelrohr	1 St.
2	04 201 21	Kappe für Ankippbügel	1 St.
3	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.

Ankippbügel gerade am Rahmen montiert

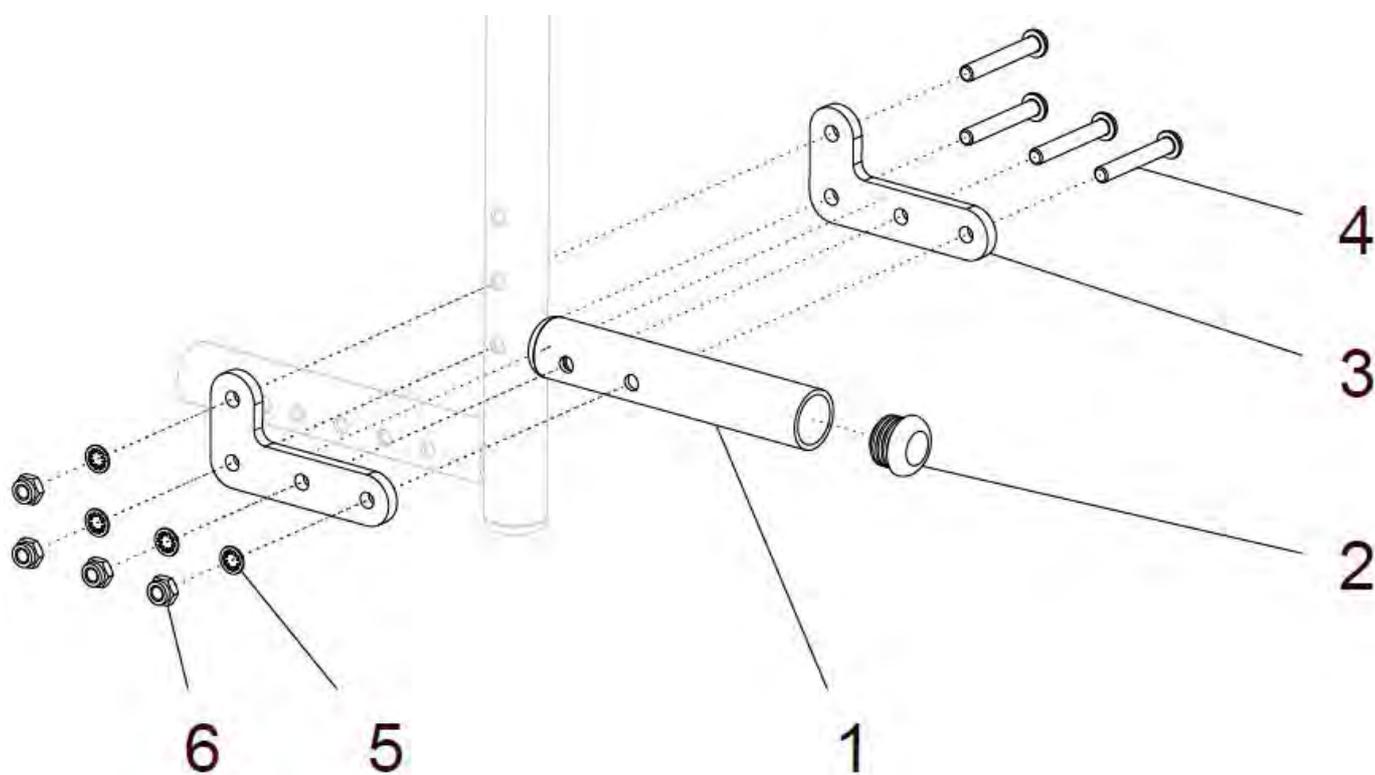


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	50 174 00	Ankippbügel gerade am Rahmen montiert kpl.	1 St.
1	50 174 11	Ankippbügelrohr gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr Scheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.

Transitrolle

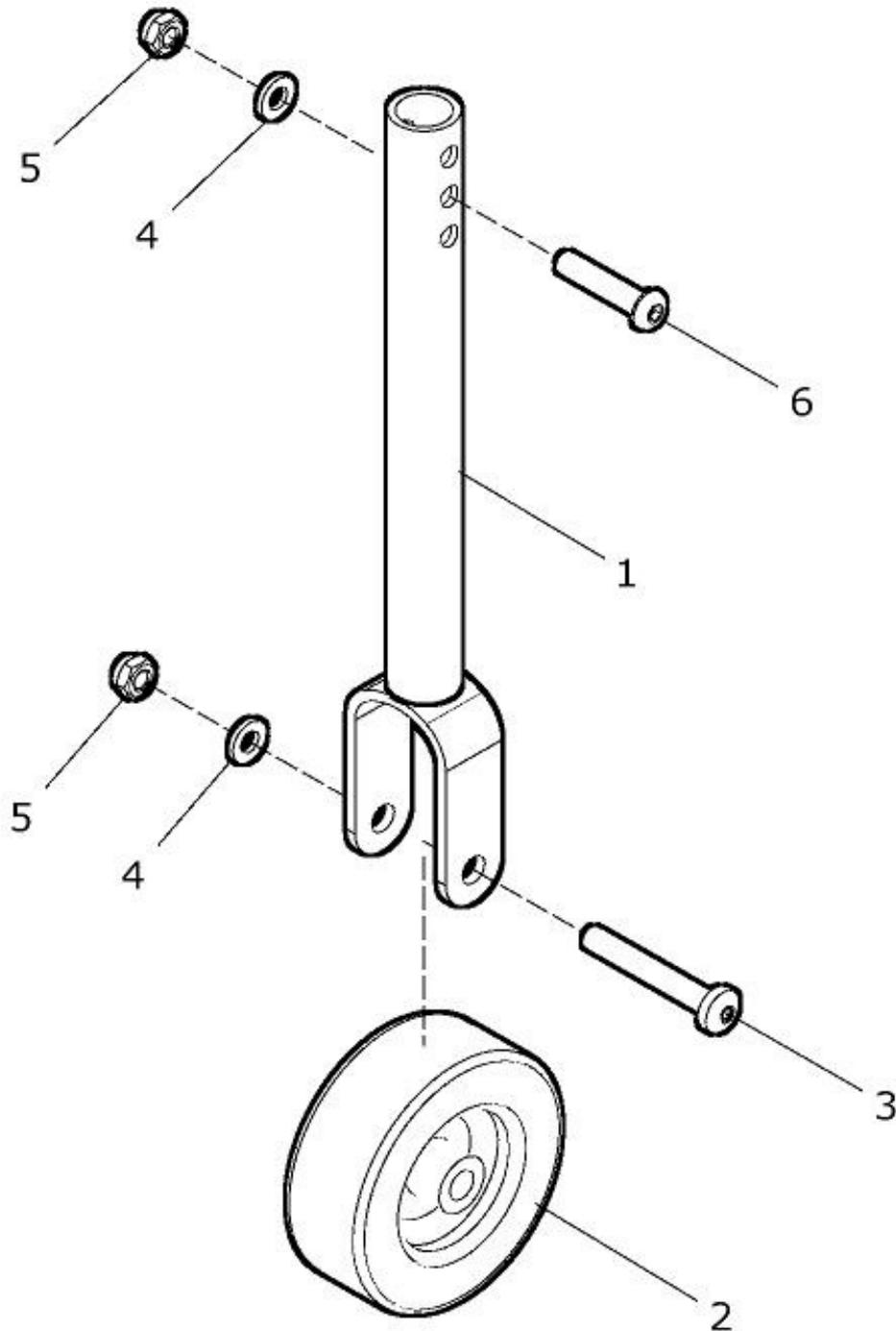


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 180 00	Transitrolle kpl.	1 St.
1 - 5	50 182 00	Transitrollenhalter mit Rad kpl.	1 St.
1	50 182 01	Transitrollenhalter (ohne Rad)	1 St.
2	05 201 71	Transitrollenrad	1 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	1 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.
6	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.

Stockhalter

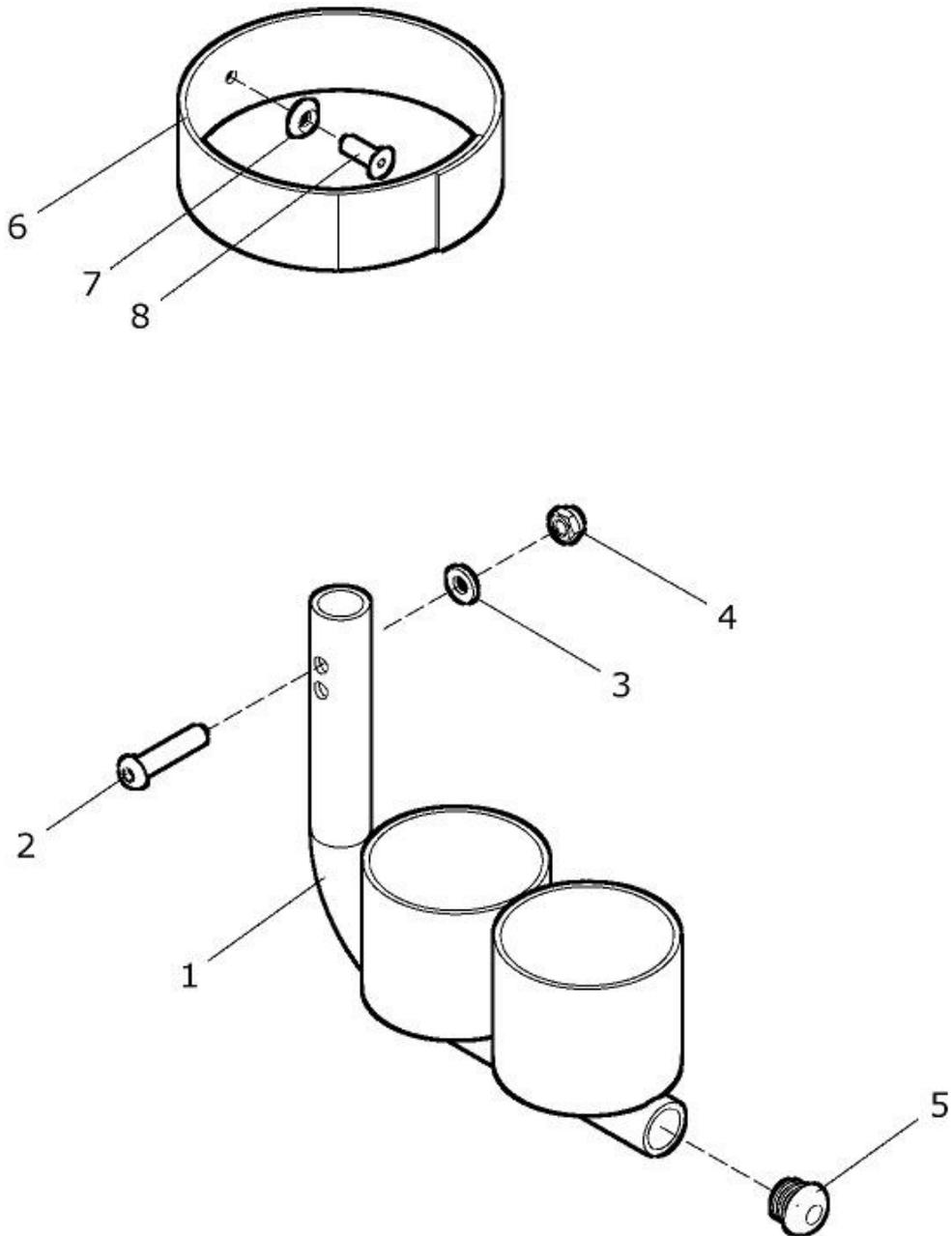


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8	50 160 00	Stockhalter kurz mit Schlaufe kpl. (standard)	1 St.
1b – 8	50 160 02	Stockhalter lang mit Schlaufe kpl. (Sonder-Version)	1 St.
1a – 5	50 162 00	Stockhalter kurz kpl.	1 St.
1b – 5	50 162 20	Stockhalter lang kpl.	1 St.
1a	50 162 01	Stockhalter kurz	1 St.
1b	50 162 02	Stockhalter lang	1 St.
2	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
3	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
5	04 210 01	Verschlussstopfen 19x2	1 St.
6 – 8	50 162 10	Schlaufe für Stockhalter kpl.	1 St.
6	50 162 11	Schlaufe für Stockhalter (Haken- und Flauschband 20mm breit, 35cm lang, Loch in der Mitte für Schraube Pos.8)	1 St.
7	01 311 01	Rosette 6,4	1 St.
8a	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	1 St.
8b	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991 (bei Rücken anpaßbar mit Lasche 40 211 01 => hierbei entfällt auch Pos.7 und 8a)	1 St.

Stockhalter gerade am Rahmen montiert

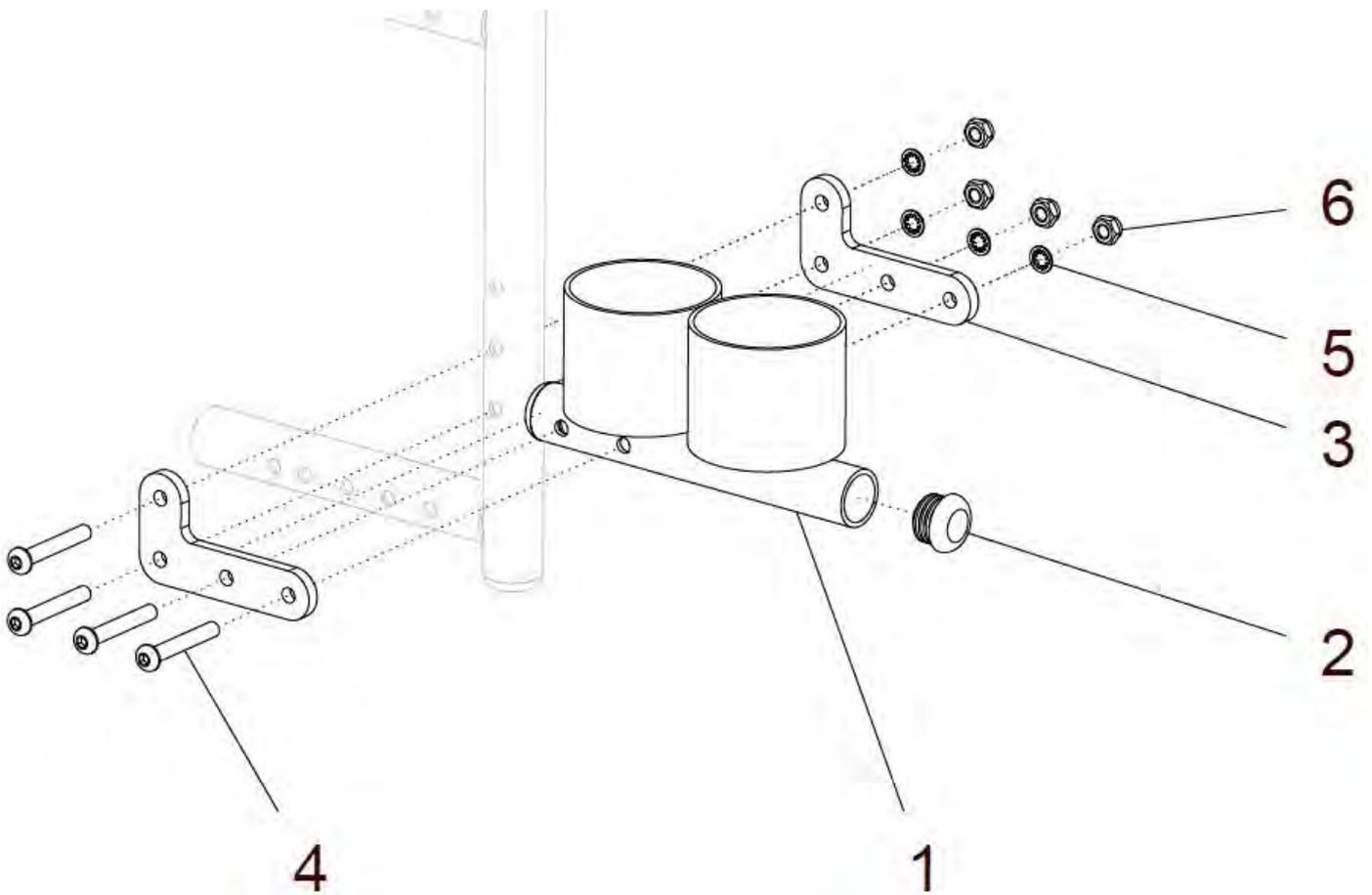

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 164 00	Stockhalter gerade am Rahmen montiert kpl.	1 St.
1	50 164 20	Stockhalter gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorrscheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.


Adapter für Rahmenanbauteile

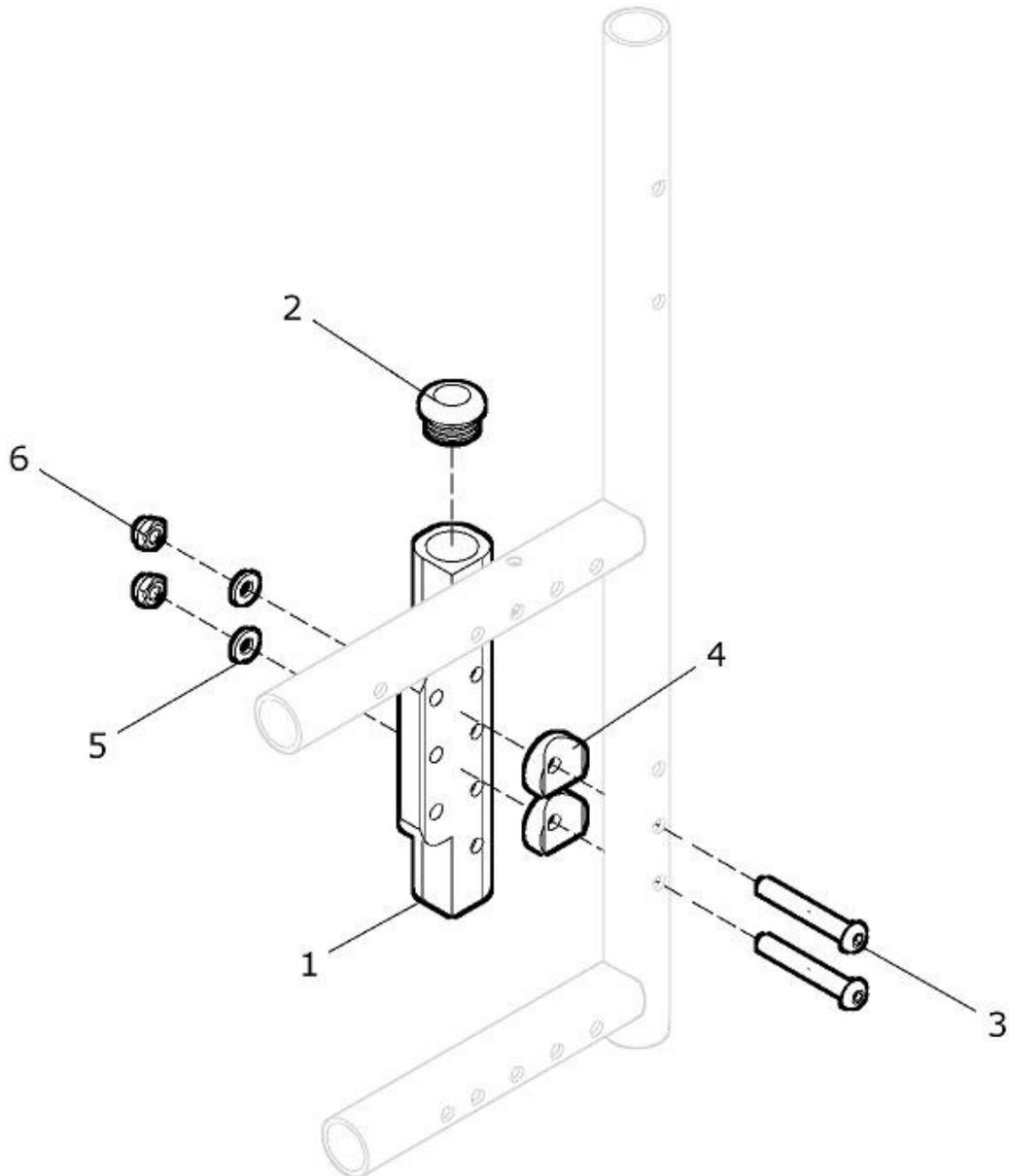


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 170 10	Adapter für Rahmenanbauteile kpl.	1 St.
1	50 172 04	Adapter	1 St.
2	04 210 02	Verschlusstopfen 23x2	1 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	2 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.

Rücken

Gruppe 2

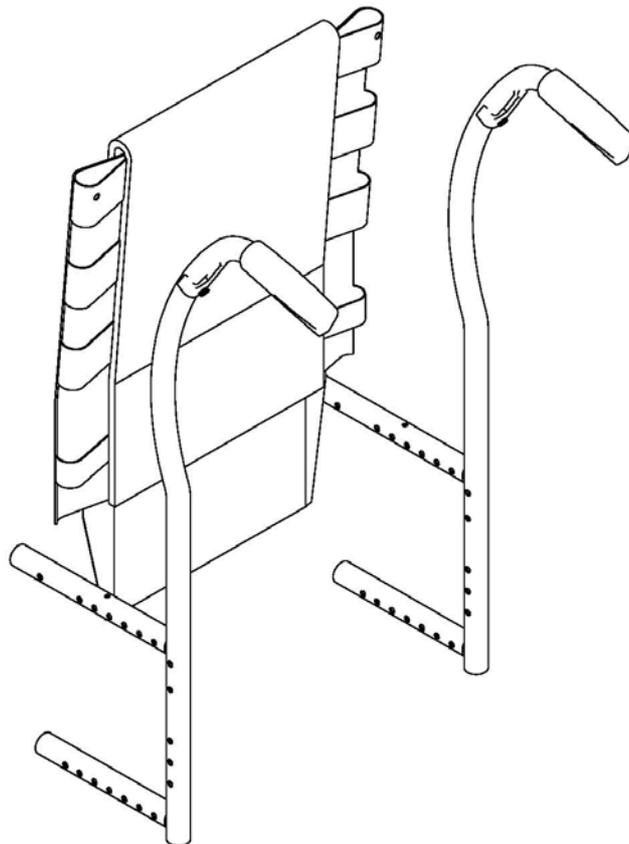


Rücken standard gerade

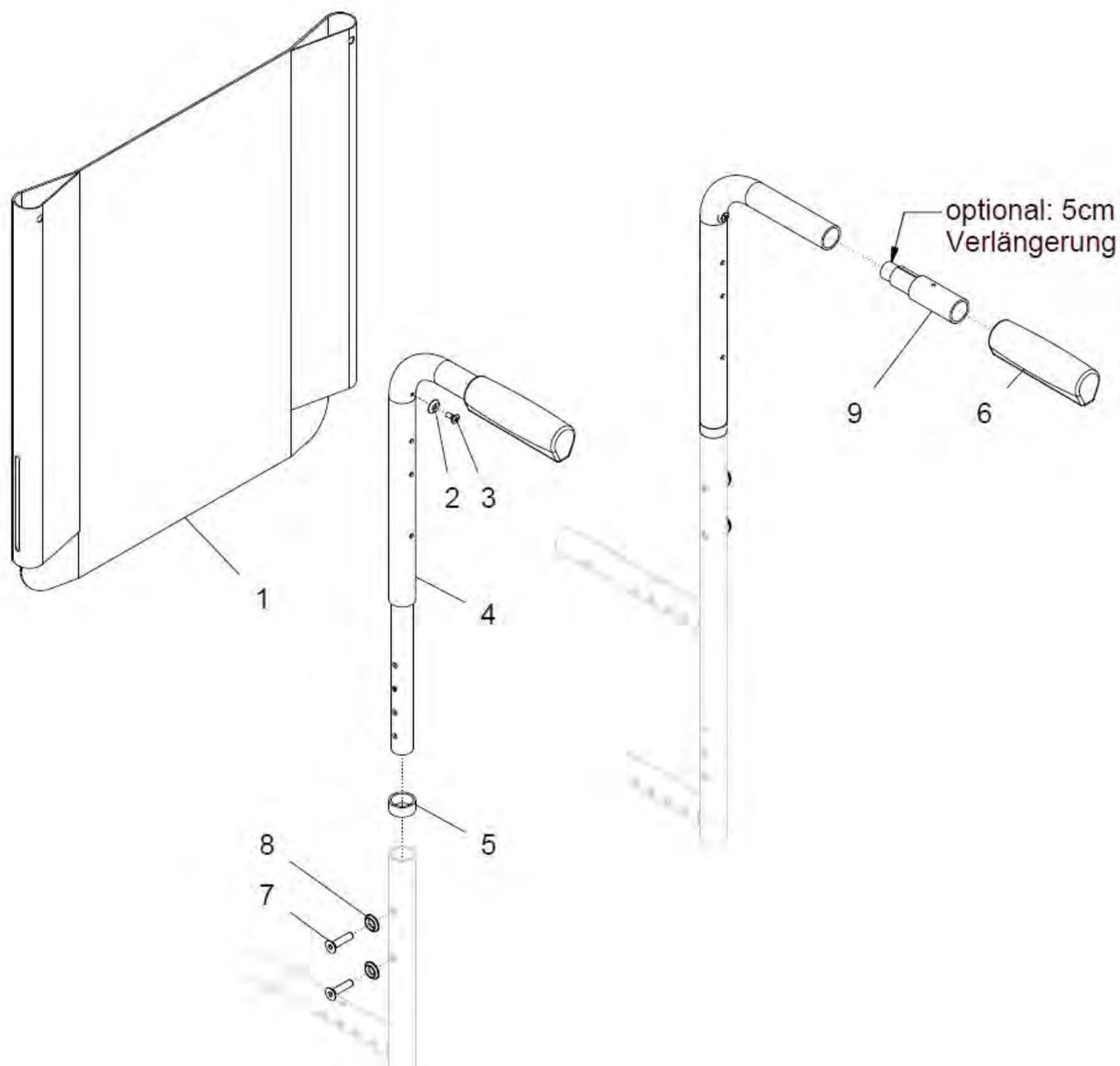


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8 (9)	20 210 00	Rücken standard gerade (starr) kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre mit Griff RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	1 St.
1	22 213 00	Rückenbespannung standard Junior2 RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...)	1 St.
2 – 3	50 214 00	Verbindungssteile für Rückenbespannung standard	2 St.
2	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
3	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	2 St.
4 – 6	20 212 00	Rückenrohr für Rücken standard kpl. RH: ? (RH 25 – 40)	2 St.
4 – 6, 9	20 212 50	Rückenrohr für Rücken standard bei Trommelbremse kpl. mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff RH: ? (RH 25 -40)	2 St.
4a	20 212 16	Rückenrohr standard RH 25 (Schiebegriff)	2 St.
4b	50 212 11	Rückenrohr standard RH 30 (Schiebegriff)	2 St.
4c	50 212 12	Rückenrohr standard RH 35 (Schiebegriff)	2 St.
4d	50 212 13	Rückenrohr standard RH 40 (Schiebegriff)	2 St.
5	25 111 01	Rahmenbuchse 10mm POM schwarz	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7 – 8	50 211 00	Verbindungssteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
7a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
7c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
8b	01 322 02	Scheibe - ø6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8c	01 321 02	Scheibe - ø6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
9	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.

Rücken standard gerade mit Zahnsegmente

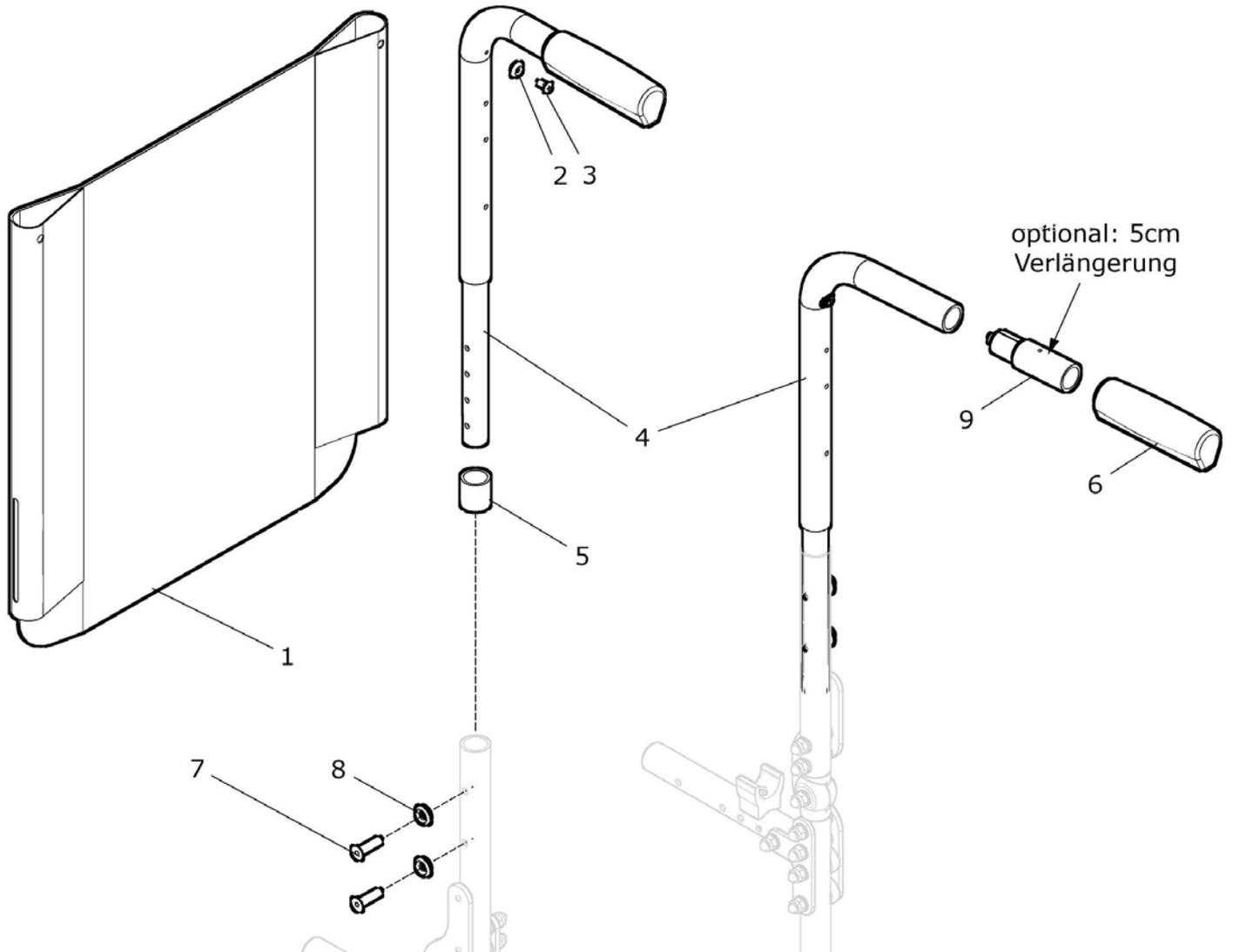

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8 (9)	20 217 00	Rücken standard gerade für Zahnsegmente kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre gerade für Rücken mit Zahnsegmente (ohne Rückenrohraufnahme) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ?	1 St.
1	22 213 00	Rückenbespannung standard Junior2 RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...)	1 St.
2 – 3	50 214 00	Verbindungssteile für Rückenbespannung standard	2 St.
2	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
3	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	2 St.
4 – 8	20 217 10	Rückenrohr gerade für Rücken mit Zahnsegment kpl. Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH : ?	2 St.
4 – 9	20 217 50	Rückenrohr gerade mit Griff für Rücken mit Zahnsegment mit Griffverlängerung für Trommelbremse kpl. Hinweis: Rückenhöhe RH = Rückenhöhe Rollstuhl – 10cm RH : ?	2 St.
4	50 271 15	Rückenrohr gerade für Rücken Zahnsegmente RH: ?	2 St.
5	50 261 05	Hülse für Rücken	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991	4 St.
8	01 350 04	Rosette 8,4	4 St.
9	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff	2 St.


Rücken anpassbar

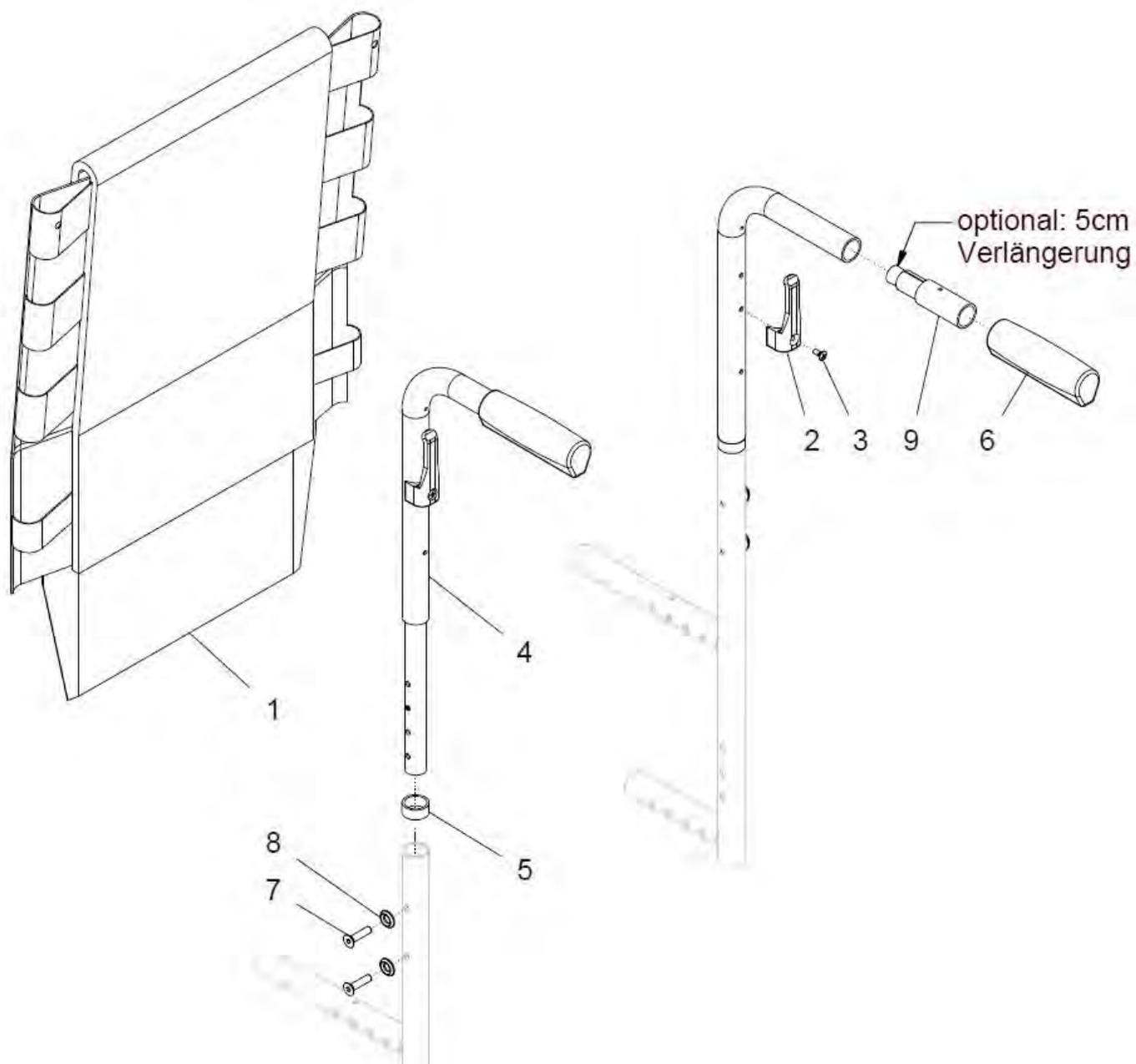

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8 (9)	20 230 00	Rücken anpassbar mit Bespannung ST... Rückenbespannung anpassbar ST... und Rückenrohre standard mit Lasche und Griff RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	kpl. 1 St.
1b – 8 (9)	20 230 10	Rücken anpassbar mit Bespannung AGW-Stoff ... Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre standard mit Lasche und Griff RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	kpl. 1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 8	20 232 00	Rückenrohr standard mit Lasche für Rückenbespannung anpassbar RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteile: ?	kpl. 2 St.
2 – 9	20 232 50	Rückenrohr standard mit Lasche / für Trommelbremse für Rückenbespannung anpaßbar mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteile: ?	kpl. 2 St.

2	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
3	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.
4a	20 212 16	Rückenrohr standard RH 25 (Schiebegriff)	2 St.
4b	50 212 11	Rückenrohr standard RH 30 (Schiebegriff)	2 St.
4c	50 212 12	Rückenrohr standard RH 35 (Schiebegriff)	2 St.
4d	50 212 13	Rückenrohr standard RH 40 (Schiebegriff)	2 St.
5	25 111 01	Rahmenbuchse 10mm POM schwarz	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7 – 8	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
7a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
7c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
8b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
9	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.


Rücken standard gerade mit Schiebegriffen höhenverstellbar
(nicht für Matrix-Rücken)

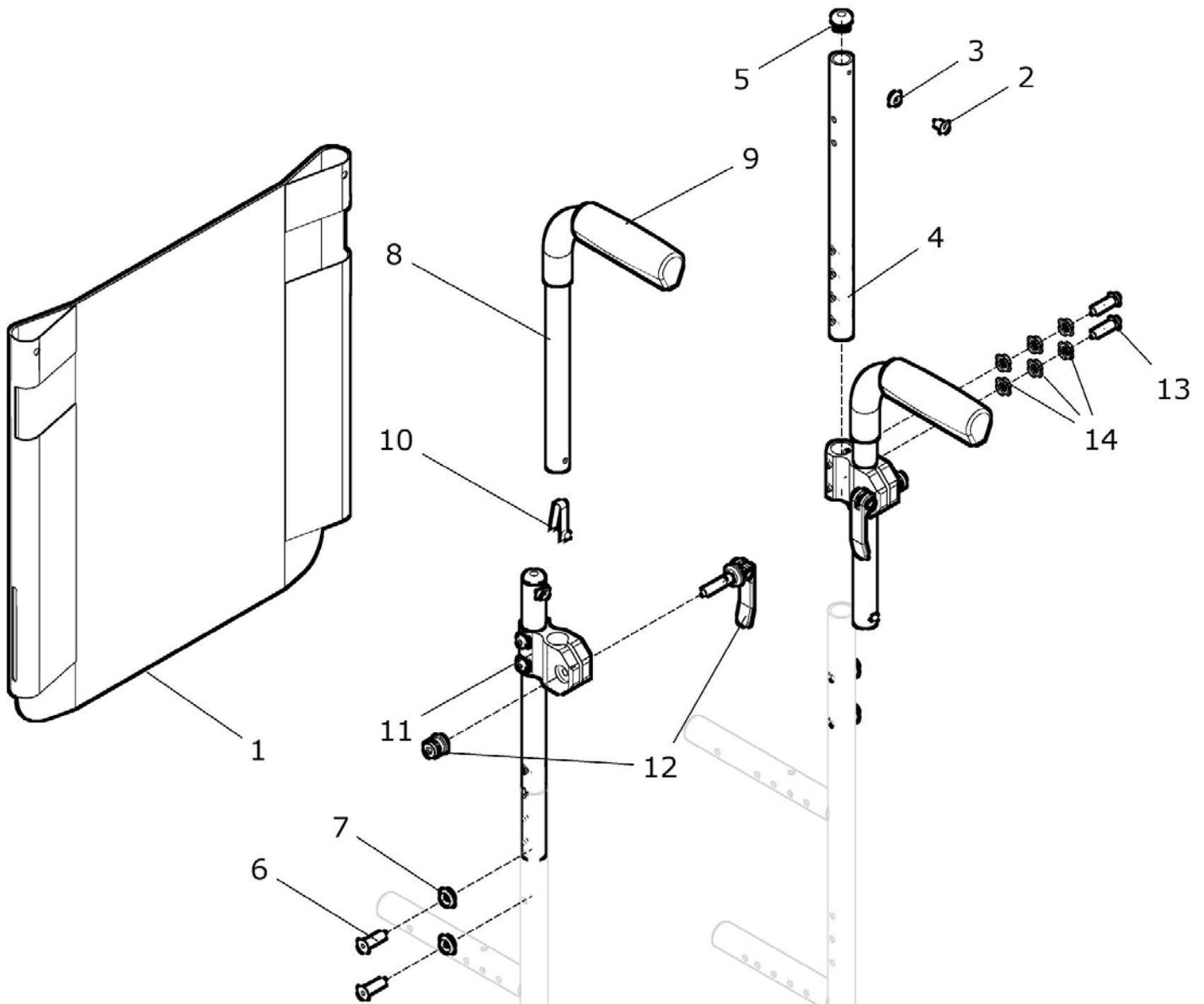

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	20 220 00	Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...) Trommelbremse: ? Seitenteil: ?	1 St.
1	22 223 00	Rückenbespannung standard für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...)	1 St.
2 - 3	50 224 00	Verbindungssteile für Rückenbespannung standard bei Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2	01 121 09	Linsensenkschraube - M5x10 - DIN 966	2 St.
3	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
4 - 7	20 222 00	Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteil: ?	2 St.
4a	20 222 10	Rückenrohr gerade RH 25 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4b	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4c	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
4d	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
5	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
6 - 7	50 211 00	Verbindungssteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
6a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
6b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
6c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a/b – 14	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
8c/d – 14	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl. Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.

8a - 10	50 225 10	Schiebegriffrohr standard mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8b - 10	50 225 16	Schiebegriffrohr lang mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8c - 10	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8d - 10	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)		2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)		2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)		2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)		2 St.
9	04 200 01	Handgriff		2 St.
10	02 320 01	Stativfeder		2 St.
11a - 14	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen	kpl.	2 St.
11b - 14	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	kpl.	2 St.
11c - 14	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	kpl.	2 St.
11a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)		2 St.
11b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse		2 St.
11c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang		2 St.
12	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32		2 St.
13	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380		4 St.
14	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6		12 St.


Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar und mit Zahnsegmente
(nicht für Matrix-Rücken)

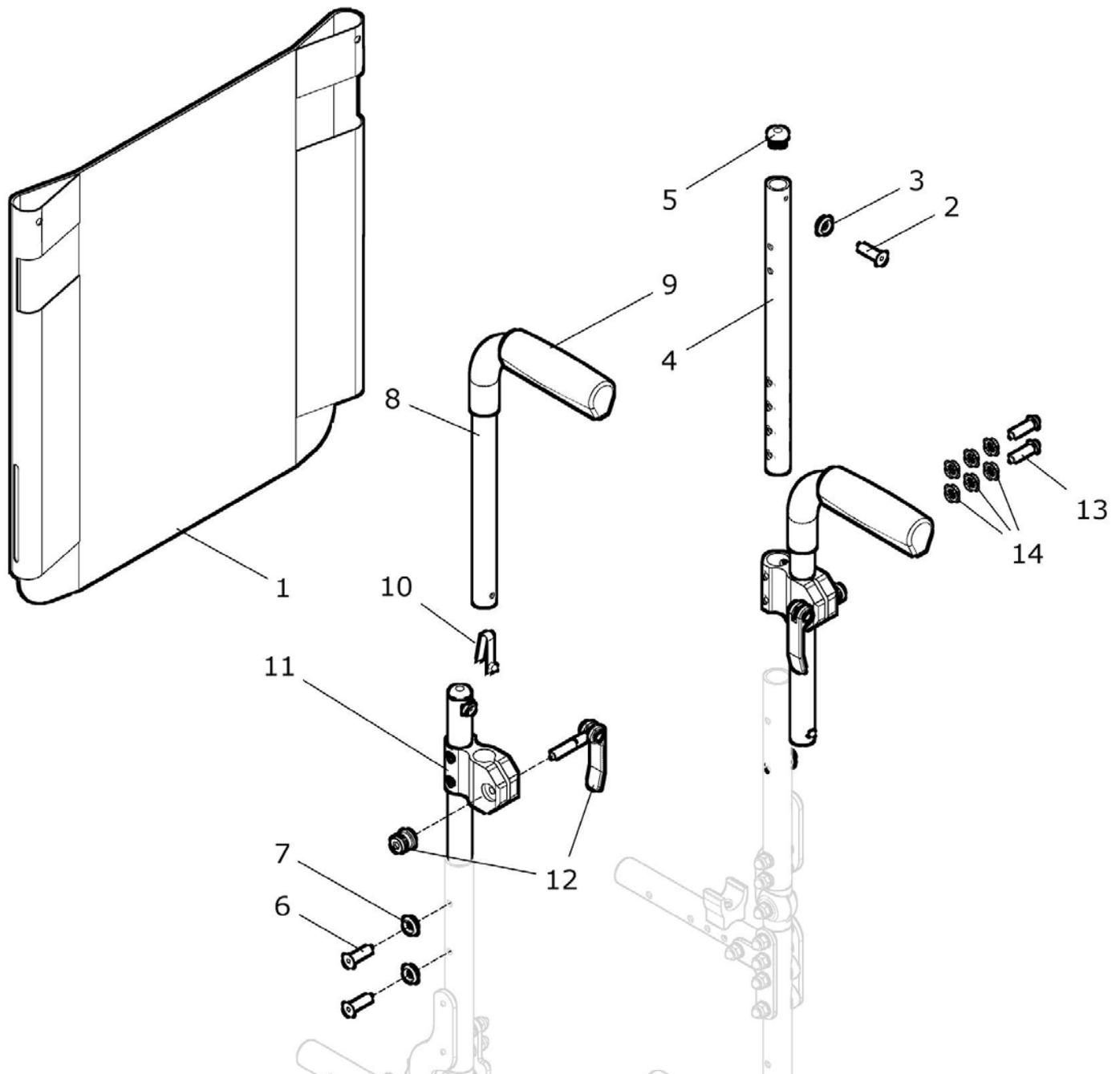

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	20 227 00	Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverst. f. Zahnseg. kpl. Rückenbespannung standard und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Rücken mit Zahnsegmente (ohne Rückenrohraufnahme) RH: ? (RH 30 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...) Trommelbremse: ?	1 St.
1	50 223 00	Rückenbespannung standard für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 30 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff ST...)	1 St.
2 - 3	50 224 00	Verbindungsteile für Rückenbespannung standard bei Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2	01 121 09	Linsensenkschraube - M5x10 - DIN 966	2 St.
3	01 350 02	Rosette 5,3	2 St.
4 - 5	20 227 10	Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment kpl.	2 St.
4	50 272 15	Rückenrohr gerade für Schiebegriffe höhenverst. bei Zahnsegment RH: ? (RH 30 – 40)	2 St.
5	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
6 – 7	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
6a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
6b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
6c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Desk-Seitenteilen, Seitenteilen lang, Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
7c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a/b – 14	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
8c/d – 14	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl. Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
8a – 10	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
8b - 10	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.

8c – 10	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8d - 10	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)		2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)		2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)		2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)		2 St.
9	04 200 01	Handgriff		2 St.
10	02 320 01	Stativfeder		2 St.
11a – 14	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen	kpl.	2 St.
11b – 14	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	kpl.	2 St
11c – 14	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	kpl.	2 St.
11a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)		2 St.
11b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse		2 St
11c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang		2 St
12	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32		2 St.
13	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380		4 St.
14	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6		12 St.

Rücken anpaßbar mit Schiebegriffen höhenverstellbar
(nicht für Matrix-Rücken)

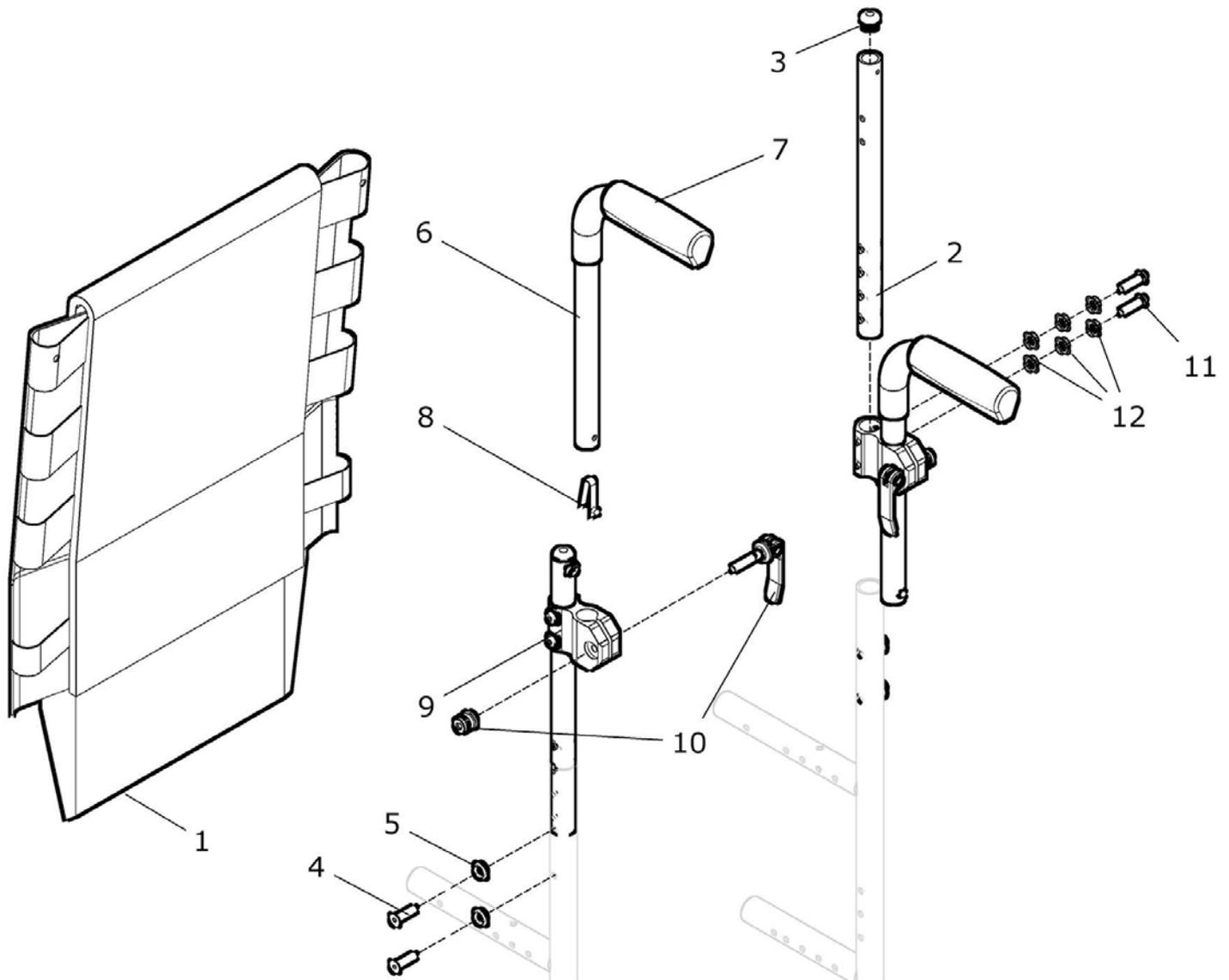


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 12	20 240 00	Rücken anpassbar mit Bespannung ST... / Schgr. höhenver. kpl. Rückenbespannung anpassbar ST... und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1b – 12	20 240 10	Rücken anpassbar mit Bespg. AGW-Stoff ... / Schgr. höhenver. kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 5	20 222 00	Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteil: ?	2 St.
2a	20 222 10	Rückenrohr gerade RH 25 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2b	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2c	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2d	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.

3	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
4 – 5	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
4a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
4b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
4c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
5b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
6a/b – 12	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
6c/d – 12	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl. Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
6a – 8	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6b – 8	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6c – 8	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6d – 8	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
6b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
6c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
6d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
7	04 200 01	Handgriff	2 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9a – 12	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
9b – 12	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl. (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	2 St.
9c – 12	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl. (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	2 St.
9a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
9b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St.

9c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St
10	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
11	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rücken FIDIBUS mit Schiebegriffen höhenverstellbar

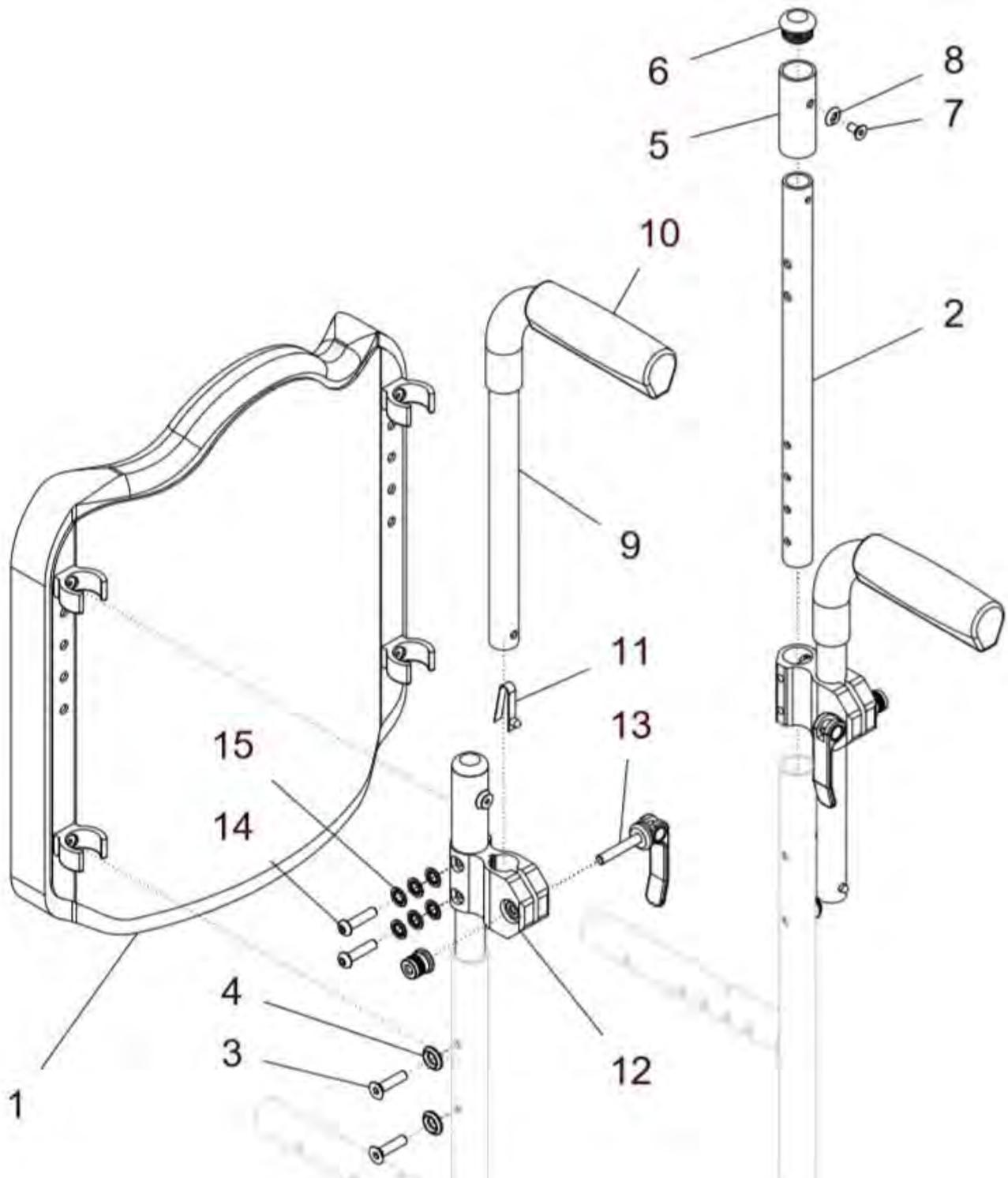


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 15	20 228 00	<p>Rücken FIDIBUS 30 mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.</p> <p>Rücken FIDIBUS und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar</p> <p>RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?</p>	1 St.
1b – 15	20 228 05	<p>Rücken FIDIBUS 50 mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.</p> <p>Rücken FIDIBUS und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar</p> <p>RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?</p>	1 St.
1c – 15	20 228 50	<p>Rücken FIDIBUS <u>ASR 30</u> mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.</p> <p>Rücken FIDIBUS <u>ASR 30</u> und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar</p> <p>RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?</p>	1 St.
1d – 15	20 228 55	<p>Rücken FIDIBUS <u>ASR 50</u> mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl.</p> <p>Rücken FIDIBUS <u>ASR 50</u> und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar</p> <p>RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?</p>	1 St.
1a	25 230 60	<p>Rücken FIDIBUS 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl.</p> <p>anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug</p> <p>SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)</p>	1 St.
1b	25 230 65	<p>Rücken FIDIBUS 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl.</p> <p>anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug</p> <p>SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)</p>	1 St.

1c	25 236 30	Rücken FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 30 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1d	25 238 30	Rücken FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 50 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
2 – 8	20 228 20	Rückenrohr mit Ausgleichrohr für Schiebegriffe höhenverst. kpl. mit Ausgleichrohr und Verschraubung RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteil: ?	2 St.
2a	20 222 10	Rückenrohr gerade RH 25 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2b	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2c	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2d	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
3 – 4	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
3a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
3b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
3c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
4a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
4b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
4c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5	85 272 21	Ausgleichsrohr oben	2 St.
6	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23mm	2 St.
7	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	2 St.
8	01 350 02	Rosette 5,3 – DIN 17670	2 St.
9a/b – 15	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.

9c/d – 15	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	kpl.	2 St.
9a – 11	50 225 10	Schiebegriffrohr standard mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9b – 11	50 225 16	Schiebegriffrohr lang mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9c – 11	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9d – 11	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)		2 St.
9b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)		2 St.
9c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)		2 St.
9d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)		2 St.
10	04 200 01	Handgriff		2 St.
11	02 320 01	Stativfeder		2 St.
12a – 15	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen	kpl.	2 St.
12b – 15	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	kpl.	2 St.
12c – 15	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	kpl.	2 St.
12a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)		2 St.
12b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse		2 St.
12c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang		2 St.
13	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32		2 St.
14	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380		4 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungscheibe NM 6		12 St.

Rückenrohr standard gerade bei Rahmen mit 30°-Rücken Gasdruckfeder

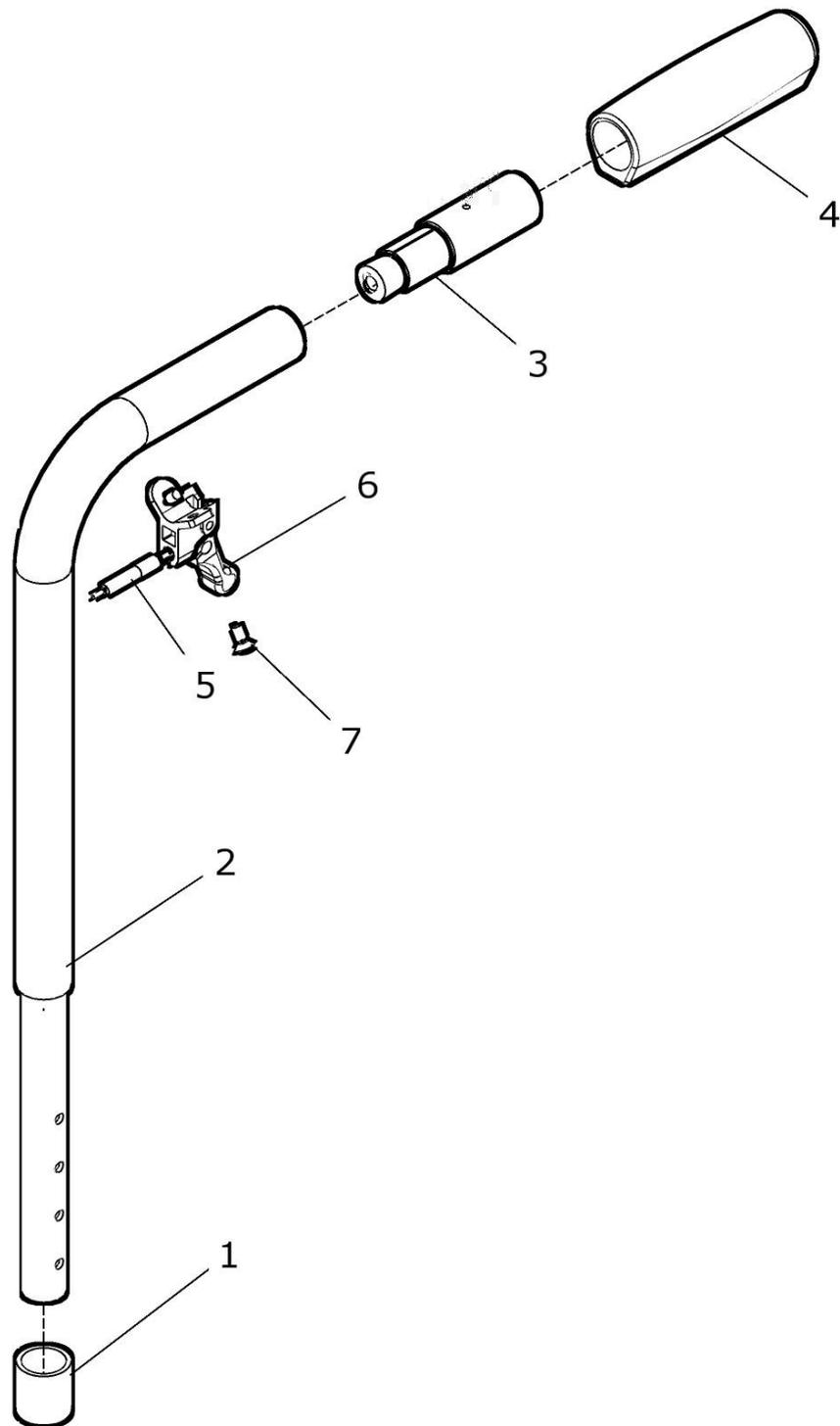


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	50 260 70	Rückenrohr-Set für 30° Rücken Gasdruckfeder/ standard kpl. Rückenrohr standard mit Verlängerung RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ?	1 Paar
1	50 261 05	Hülse für Rücken 30°	2 St.
2a + 2b	50 261 70	Rückenrohr 30° Rücken Gasdruckfeder / standard ohne Verlängerung (mit Gewinde M4) RH bei 30°-Rücken: ?	1 Paar
2a	50 261 72	Rückenrohr rechts 30° Rücken Gasdruckfeder standard RH bei 30°-Rücken: ?	1 St.
2b	50 261 73	Rückenrohr links 30° Rücken Gasdruckfeder standard RH bei 30°-Rücken: ?	1 St.
3a	50 734 00	Verlängerung 5cm kpl. (ohne Trommelbremse)	2 St.
3b	50 734 10	Verlängerung 7,5cm kpl. (wenn Trommelbremse vorhanden)	2 St.
4	04 200 01	Handgriff	2 St.
5 – 7	50 261 45	Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl. RH: ? Rückenrohr: ?	2 Set
5a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
5b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
5c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
6	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.
7	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder

o. Bild	50 261 50	Rückenbespannung standard für 30°-Rücken Gasdruckfeder RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST... für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.

Rückenrohr standard gerade bei Rahmen mit 30°-Rücken mechanisch

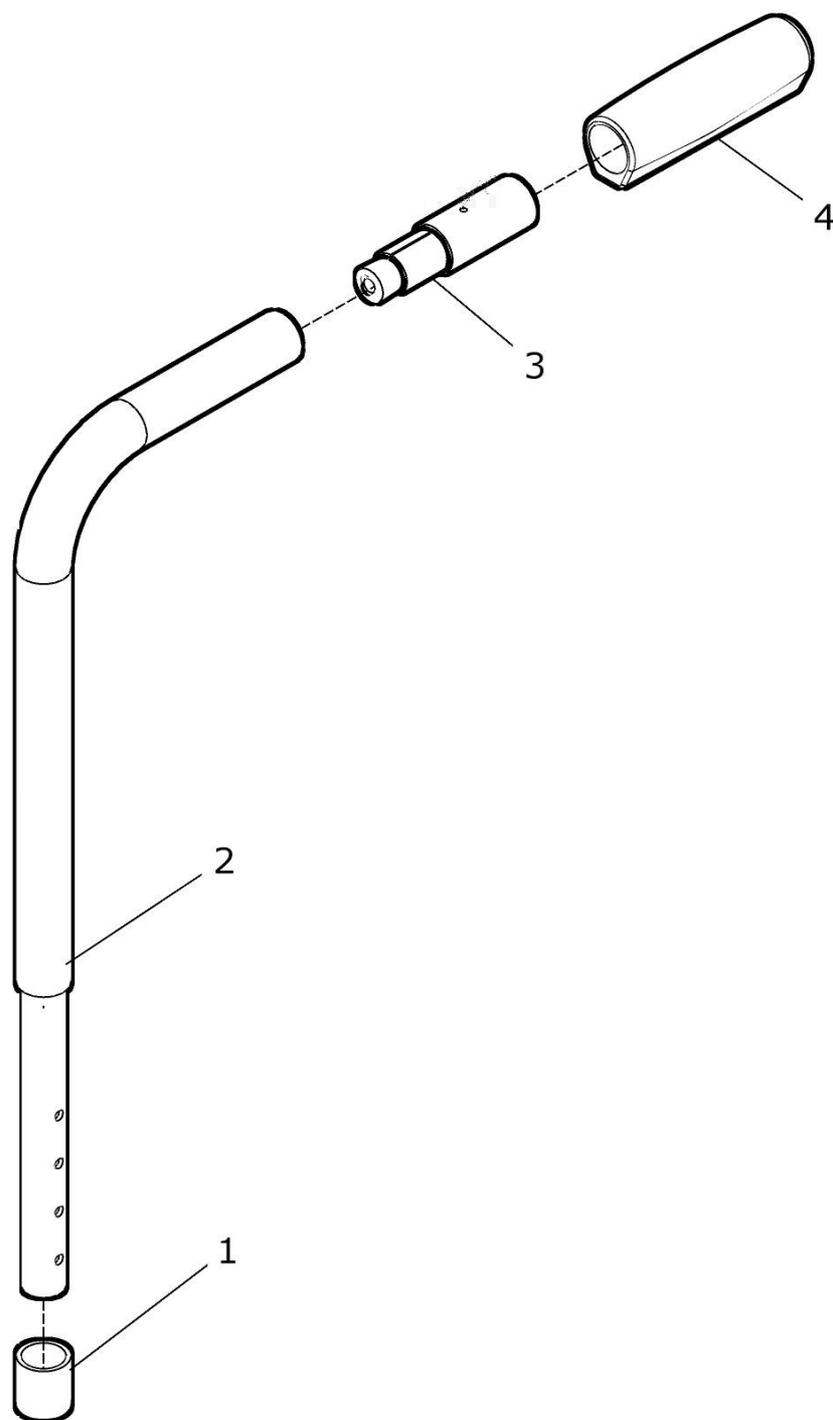


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	50 262 70	Rückenrohr-Set für 30° Rücken mechanisch Rückenrohr standard mit Verlängerung kpl. RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ?	1 Paar
1	50 261 05	Hülse für Rücken 30°	2 St.
2	50 262 71	Rückenrohr 30° Rücken mechanisch standard RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
3	50 734 00	Verlängerung 5cm kpl.	2 St.
4	04 200 01	Handgriff	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mechanisch

o. Bild	50 262 50	Rückenbespannung standard für 30°-Rücken mechanisch (auch für Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST... für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.

**Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar
bei Rahmen mit 30°-Rücken-Gasdruckfeder**

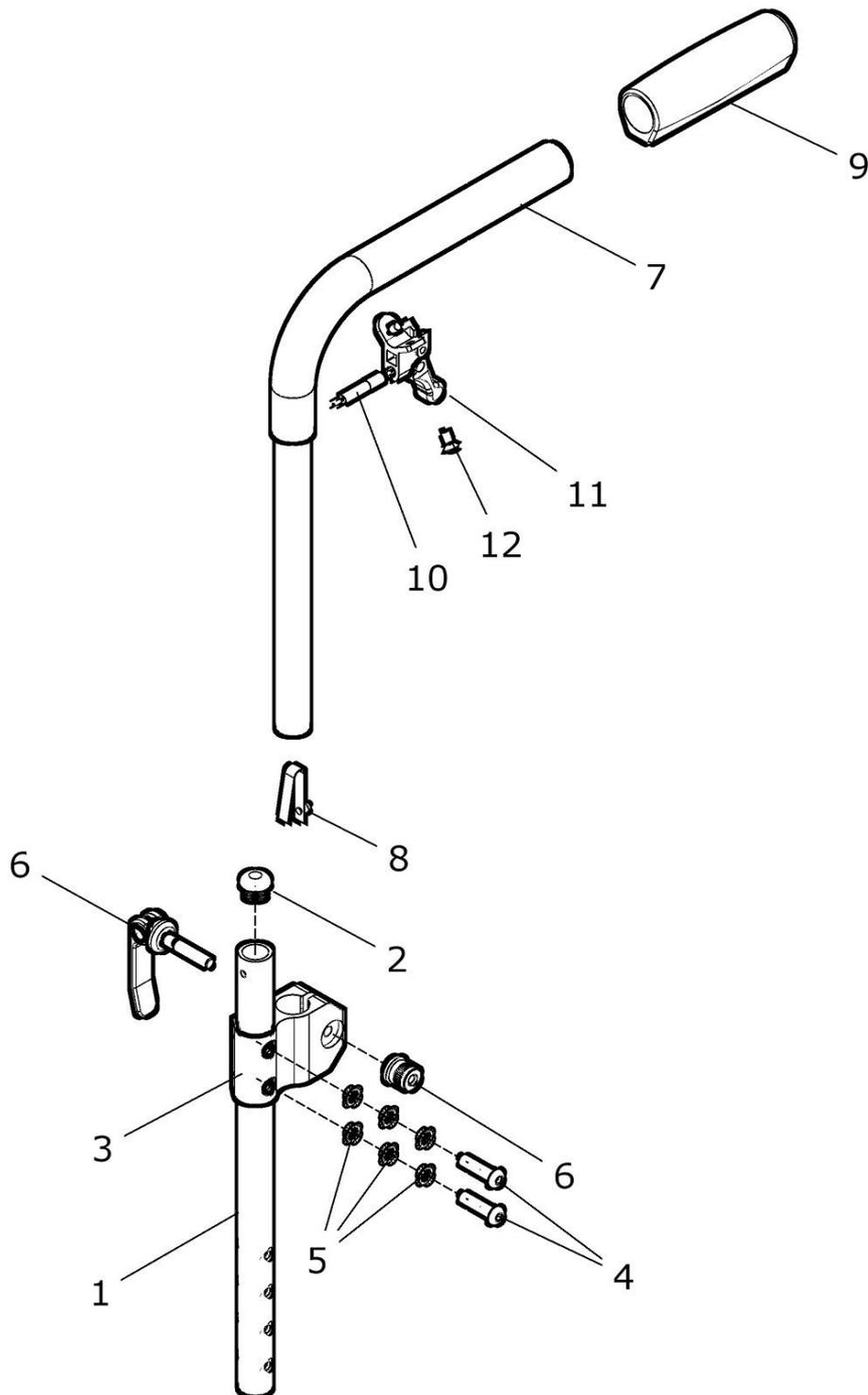

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	50 260 80	Rückenrohr-Set 30° Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar kpl. bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ? Schiebegriffhalter: ? Typ Schiebegriffrohr: ?	1 Paar
1	50 261 85	Rückenrohr 30°-Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
3a - 6	50 225 50	Schiebegriffhalter standard mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3b - 6	50 225 60	Schiebegriffhalter standard mitt Buchse u. Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3c - 6	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
3b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse (Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
3c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang (mit Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
4	01 152 23	Linsenschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	12 St.
6	01 198 03	Schnellspannhebel M6x32	2 St.
7a, 7b - 9	50 265 10	Schiebegriffe höhenverst. re. + li. (15cm) für 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	1 Paar
7a - 9	50 265 12	Schiebegriff höhenverst. rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7b - 9	50 265 13	Schiebegriff höhenverst. links (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7a	50 265 12G	Schiebegriffrohr rechts für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7b	50 265 13G	Schiebegriffrohr links für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7c, 7d - 9	50 265 20	Schiebegriffe lang höhenv. re. + li. (35cm) für 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe lang höhenverstellbar rechts und links (35cm) für 30°-Rücken	1 Paar
7c - 9	50 265 22	Schiebegriff lang höhenv. rechts (35cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7d - 9	50 265 23	Schiebegriff lang höhenv. links (35cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7c	50 265 22G	Schiebegriffrohr lang rechts für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (35cm)	1 St.
7d	50 265 23G	Schiebegriffrohr lang links für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (35cm)	1 St.
7e, 7f - 9	50 265 30	Schiebegriffe extra lang höhenverst. re. + li. (45cm) 30°-Rü. kpl. Schiebegriffe extra lang höhenverstellbar rechts und links (45cm) für 30°-Rücken	1 Paar
7e - 9	50 265 32	Schiebegriff extra lang höhenverst. rechts (45cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7f - 9	50 265 33	Schiebegriff extra lang höhenverst. links (45cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.


7e	50 265 32G	Schiebegriffrohr extra lang rechts für 30°-Rü. / mit 5cm Verlängerung (45cm)	1 St.
7f	50 265 33G	Schiebegriffrohr extra lang links für 30°-Rü. / mit 5cm Verlängerung (45cm)	1 St.
7g, 7h – 9	50 265 15	Schiebegriffe höhenv. Trbr. re. + li. (15cm) für 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links (15cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	1 Paar
7g – 9	50 265 16	Schiebegriff höhenv. Trbr. rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7h – 9	50 265 17	Schiebegriff höhenv. Trbr. links (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7g	50 265 16G	Schiebegriffrohr rechts Trbr. für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7h	50 265 17G	Schiebegriffrohr links Trbr. für 30°-Rücken / mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7i, 7j – 9	50 265 25	Schiebegriffe lang höhenv. Trbr. re.+li. (35cm) für 30°-Rü. kpl. Schiebegriffe lang höhenverstellbar rechts und links (35cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	1 Paar
7i – 9	50 265 26	Schiebegriff lang höhenv. Trbr. rechts (35cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7j – 9	50 265 27	Schiebegriff lang höhenv. Trbr. links (35cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7i	50 265 26G	Schiebegriffrohr lang rechts Trbr. für 30°-Rü./ mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7j	50 265 27G	Schiebegriffrohr lang links Trbr. für 30°-Rü./ mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7k, 7l – 9	50 265 35	Schiebegriffe extra lang höh.Trbr. re. + li. (45cm) 30°-Rü. kpl. Schiebegriffe extra lang höhenverstellbar rechts und links (45cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	1 Paar
7k – 9	50 265 36	Schiebegriff extra lang höhenv. Trbr. rechts (45cm) 30°-Rü. kpl.	1 St.
7l – 9	50 265 37	Schiebegriff extra lang höhenv. Trbr. links (45cm) 30°-Rü. kpl.	1 St.
7k	50 265 36G	Schiebegriffrohr extra lang rechts Trbr. für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (45cm)	1 St.
7l	50 265 37G	Schiebegriffrohr extra lang links Trbr. für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (45cm)	1 St.
7m, 7n – 9	50 265 40	Schiebegriffe abgekröpft rechts + links 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe abgekröpft rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	1 Paar
7m – 9	50 265 42	Schiebegriff abgekröpft rechts (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7n – 9	50 265 43	Schiebegriff abgekröpft links (15cm) für 30°-Rücken kpl.	1 St.
7m	50 265 42G	Schiebegriffrohr abgekröpft rechts für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (15cm)	1 St.
7n	50 265 43G	Schiebegriffrohr abgekröpft links für 30°-Rü. / mit 5cm Verläng. (15cm)	1 St.
7o, 7p – 9	50 265 45	Schiebegriffe abgekröpft Trbr. rechts + links 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe abgekröpft rechts und links (15cm) für 30°-Rücken und für Trommelbremse	1 Paar
7o – 9	50 265 46	Schiebegriff abgekröpft Trbr. rechts (15cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7p – 9	50 265 47	Schiebegriff abgekröpft Trbr. links (15cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7o	50 265 46G	Schiebegriffrohr abgekröpft Trbr. rechts für 30°-Rü./ mit 7,5cm Verlängerung	1 St.
7p	50 265 47G	Schiebegriffrohr abgekröpft Trbr. links für 30°-Rü. / mit 7,5cm Verlängerung	1 St.
7q, 7r – 9	50 265 60	Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt re. + li. 30°-Rücken kpl. Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt rechts und links (15cm) für 30°-Rücken	1 Paar
7q – 9	50 265 62	Schiebegriff nach hinten abgewinkelt re. (15cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.

7r – 9	50 265 63	Schiebegriff nach hinten abgewinkelt li. (15cm) für 30°-Rü. kpl.	1 St.
7q	50 265 62G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt rechts für 30°-Rücken mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7r	50 265 63G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt links für 30°-Rücken mit 5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7s, 7t – 9	50 265 65	Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt Trbr. re. + li. 30°-Rü. kpl. Schiebegriffe nach hinten abgewinkelt rechts und links für 30°-Rücken und für Trommelbremse (15cm)	1 Paar
7s - 9	50 265 66	Schiebegriff nach hinten abgewinkelt Trbr re. (15cm) 30°-Rü. kpl.	1 St.
7t – 9	50 265 67	Schiebegriff nach hinten abgewinkelt Trbr li. (15cm) 30°-Rü. kpl.	1 St.
7s	50 265 66G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt Trbr. rechts für 30°-Rücken mit 7,5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
7t	50 265 67G	Schiebegriffrohr nach hinten abgewinkelt Trbr. links für 30°-Rücken mit 7,5cm Verlängerung (15cm)	1 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.
10 – 12	50 261 45	Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl. RH: ? Rückenrohr: ?	2 Set
10a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
10b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
10c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
11	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.
12	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mit Gasdruckfeder

o. Bild	50 261 55	Rückenbespannung standard für Schgr. höhenv. für 30°-Rücken-Gasf. RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST... für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.

**Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar
bei Rahmen mit 30°-Rücken mechanisch**

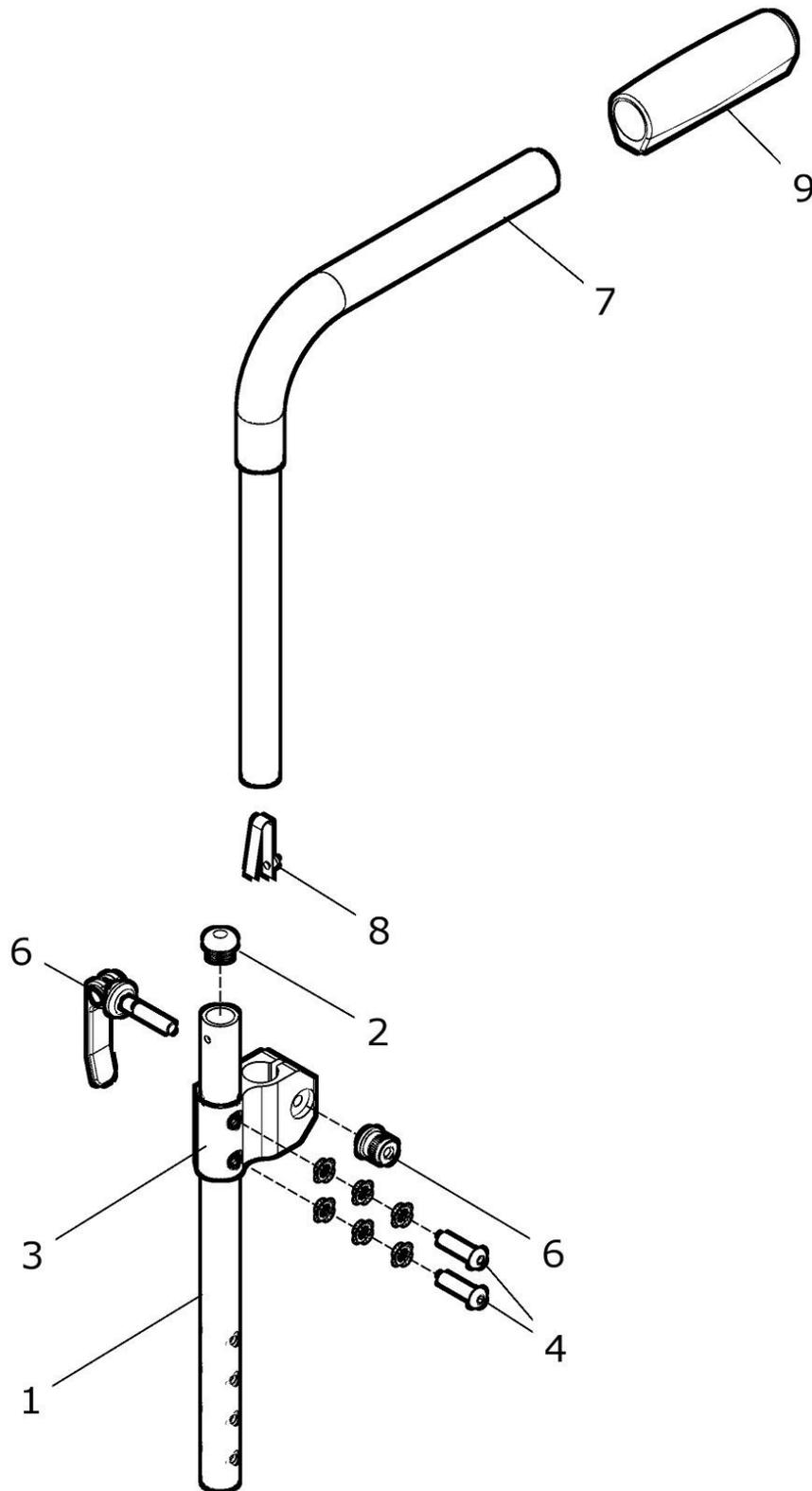


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	50 262 95	Rückenrohr-Set 30° Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar kpl. bei 30°-Rücken mechanisch winkelverstellbar RH bei 30°-Rücken: ? Trommelbremse: ? Schiebegriffhalter: ?	1 Paar
1	50 261 85	Rückenrohr 30°-Rücken für Schiebegriff höhenverstellbar RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	04 210 01	Verschlußstopfen Ø19x2mm	2 St.
3 - 6, 7a/b - 9	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
3 - 6, 7c/d - 9	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl. Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
3a - 6	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3b - 6	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3c - 6	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
3a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
3b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse (Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
3c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang (mit Buchse für Stabi.stange oder Kopfstütze)	2 St.
4	01 152 23	Linsenschraube M6x25 – ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	12 St.
6	01 198 03	Schnellspannhebel M6x32	2 St.
7a - 9	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
7b - 9	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
7c - 9	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
7d - 9	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
7a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
7b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
7c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
7d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9	04 200 01	Handgriff	2 St.

Rückenbespannungen bei 30°-Rücken mechanisch


o. Bild	50 262 50	Rückenbespannung standard / Schgr. höhenv. für 30°-Rücken mech. RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 00	Rückenbespannung anpaßbar ST... für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
o. Bild	50 264 05	Rückenbespannung anpaßbar AGW-Stoff xx für 30°-Rücken RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.

Rücken anpassbar UNITOMIC mit Griff

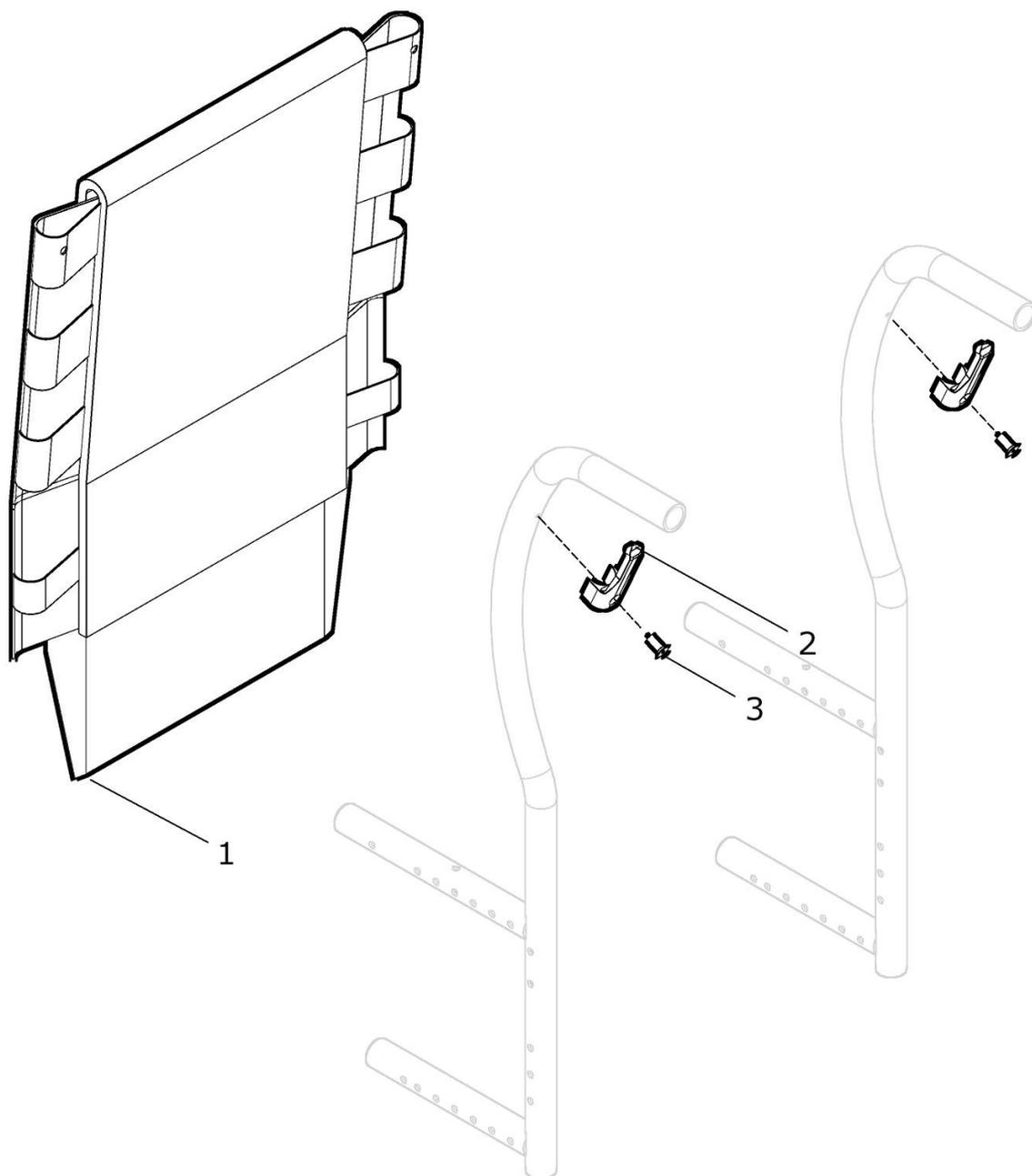

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 3	40 210 00	Rückenbespannung anpassbar Bespannung ST... kpl. Rückenbespannung anpassbar ST... mit Laschen RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b – 3	40 210 10	Rückenbespannung anpassbar Bespannung AGW-Stoff ... / kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... mit Laschen RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
3	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.


Rücken UNITOMIC anpaßbar mit Schiebegriffe höhenverstellbar

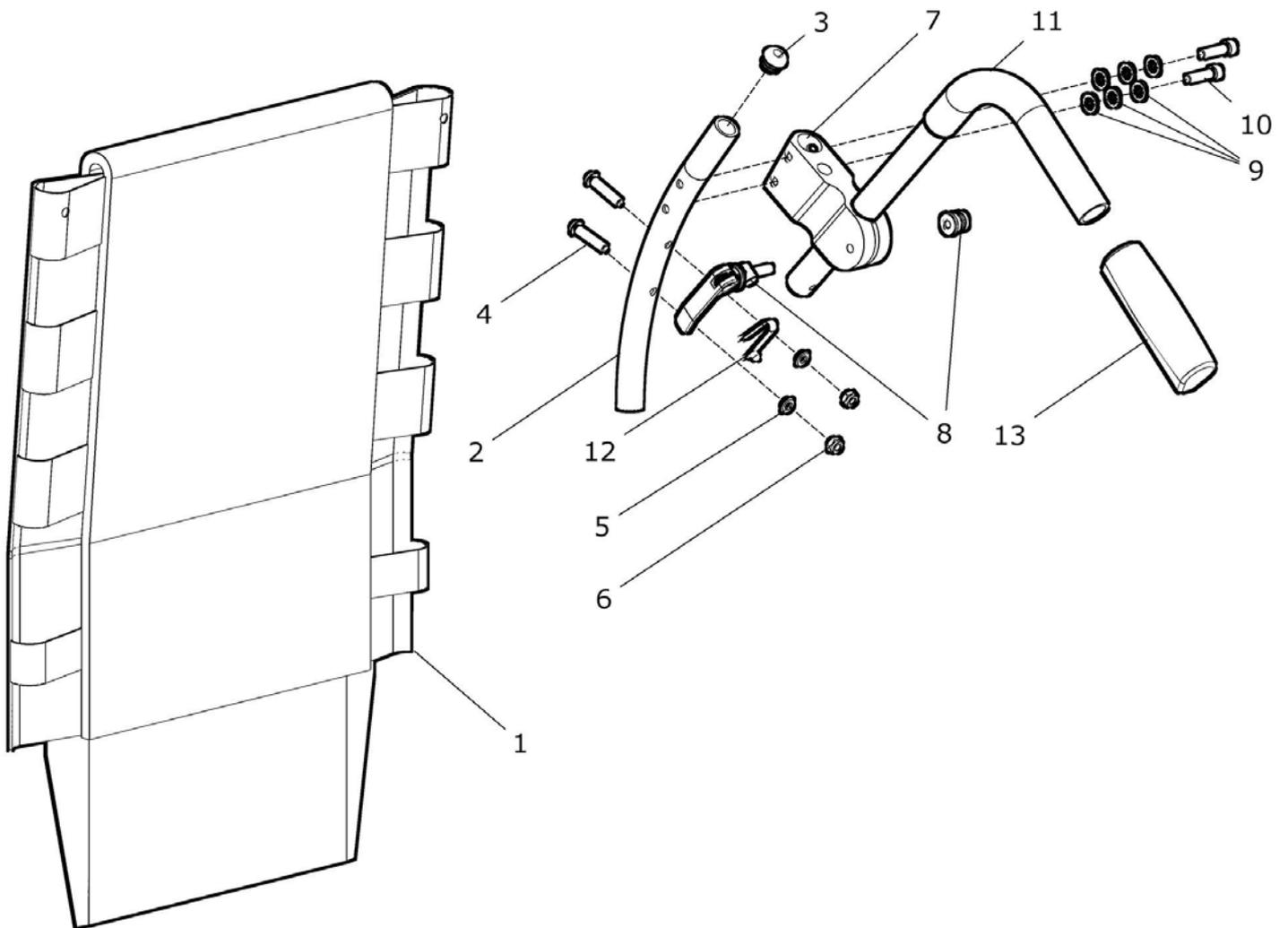

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 13	40 220 00	Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / ST... kpl. Rückenbespannung anpassbar ST ... und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ?	1 St.
1b – 13	40 220 10	Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / Stoff xx kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ?	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 7, 8 – 11a, 12 – 13	40 221 00	Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Paar kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 Paar
2 – 7a, 8 – 11a, 12 – 13	40 222 00	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
2 – 7b, 8 – 11a, 12 – 13	40 223 00	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.

2 – 7, 8 – 11b, 12 – 13	40 221 05	Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. Paar kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 Paar
2 – 7a, 8 – 11b, 12 – 13	40 222 05	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. rechts kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 St.
2 – 7b, 8 – 11b, 12 – 13	40 223 05	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. links kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 St.
2	40 221 11	Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar	2 St.
3	04 210 01	Verschlussstopfen 19mm	2 St.
4	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.
7 - 10	40 225 50	Halter UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar Paar kpl. rechts und links	1 Paar
7a – 10	40 225 62	Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts kpl.	1 St.
7b – 10	40 225 63	Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar links kpl.	1 St.
7a	40 225 52	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts	1 St.
7b	40 225 53	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links	1 St.
8	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
9	01 330 01	Schnorr-Scheibe NM 6	12 St.
10	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 – ISO 7380	4 St.
11a – 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b - 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff	2 St.

Kopfstütze

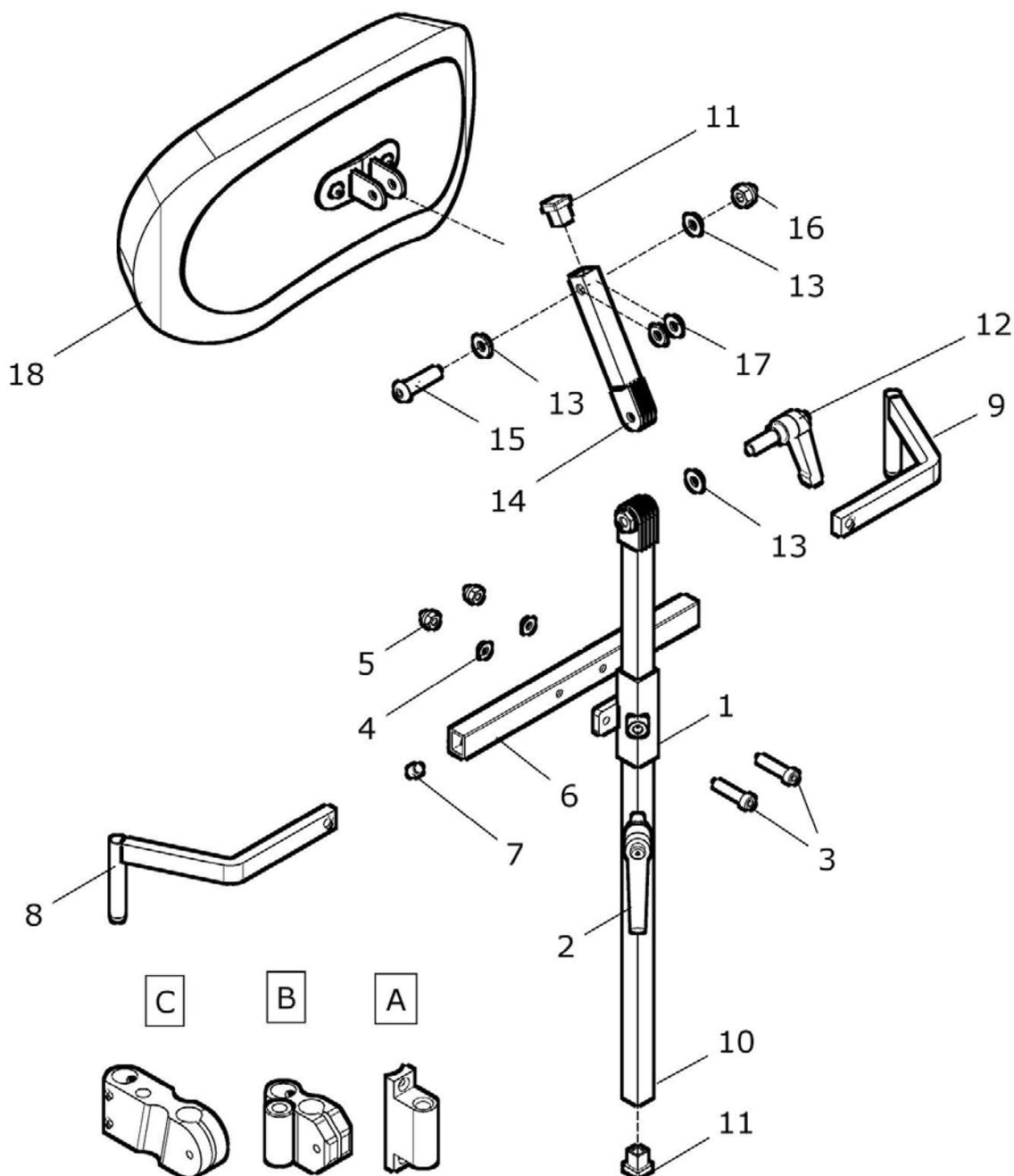

Befestigungsvarianten:

A: Rücken standard / UNITOMIC


B: Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar / lang

C: Rücken UNITOMIC mit Schiebegriffen höhenverstellbar

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8a, 9a - 18	20 262 00	Kopfstütze universal mit 1 Gelenk für Rücken gerade kpl. Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk für Rücken gerade SB: ? Befestigungsvariante: A oder B ???	1 St.
1 - 8b, 9b - 18	20 262 05	Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC Schgr. höh. kpl. für UNITOMIC-Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar SB: ? für Befestigungsvariante: C	1 St.
1 - 8b 9b - 18	20 262 07	Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC kpl. für UNITOMIC-Rücken mit normalen Schiebegriffen SB: ? für Befestigungsvariante: A	1 St.
1 - 9	20 262 10	Kopfstützenquerstange gerade / UNITOMIC kpl (ohne Kopfstützenhalter winkelverstellbar) Rücken: gerade oder UNITOMIC ? SB: ?	1 St.
1	20 262 15	Führung Kopfstützenhalter	1 St.
2	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
3	01 160 75	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
5	01 120 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
6	40 262 50	Führungsrohr SB: ?	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
8a	20 262 19	Haken kurz links (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
8b	40 262 13	Haken schräg links für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
9a	40 262 18	Haken kurz rechts (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
9b	40 262 12	Haken schräg rechts für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
10 - 18	20 262 70	Kopfstütze mit 1 Gelenk winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl. Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk (ohne Querträger) SB: ?	1 St.
10 - 17	20 262 30	Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl. (ohne Kopfstütze Muschelform) SB: ?	1 St.
10a	20 262 24	Kopfstützenträger 500mm (bei Kopfstütze groß)	1 St.
10b	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm (bei Kopfstütze mini)	1 St.
11	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
12	01 190 02	Klemmhebel M8x25	1 St.
13	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 zns schwarz	3 St.
14	20 262 25	Kopfstützenhalterstück 90mm	1 St.


15	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 - ISO 7380 zns schwarz	1 St.
16	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns schwarz	1 St.
17	01 325 03	Scheibe Messing - 8,4 - DIN 125	2 St.
18a	20 262 20	Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.	1 St.
18a.1	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
18a.2	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
18b	20 262 50	Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.	1 St.
18b.1	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
18b.2	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
A	20 262 11	Halter für Kopfstützenquerstange bei Rücken standard / UNITOMIC-Rücken (rechts / links) verwendbar	2 St.
B1	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse bei Kleiderschutz-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabstange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
B2	50 225 55	Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen / für Kopfstütze bzw. Stabstange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
C	40 225 62	Halter rechts für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.
C	40 225 63	Halter links für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC-Rücken	1 St.

Stabilisierungsstange / Schiebestange am Griff montiert

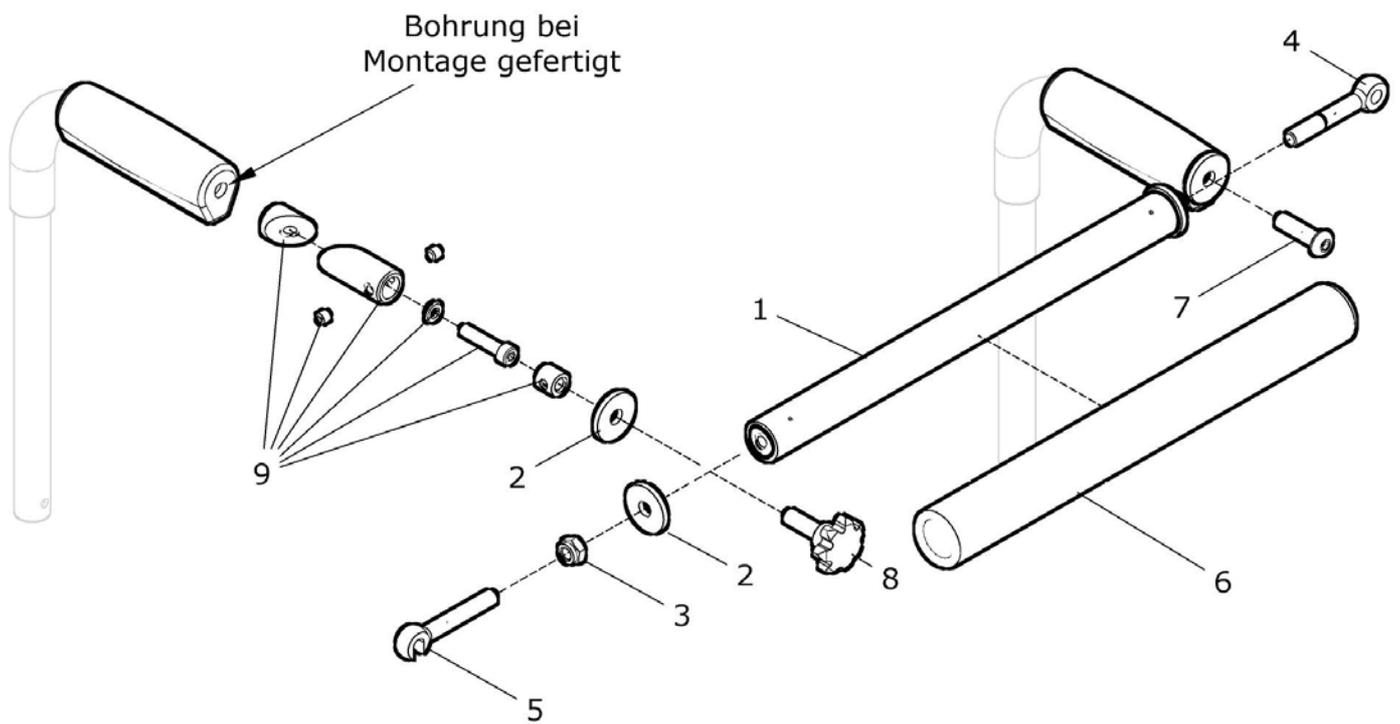


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	50 263 00	Stabilisierungs- / Schiebestange am Griff kpl. SB: ?	1 St.
1	50 263 10	Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2	01 321 13	Scheibe - 8,4 – DIN 9021	4 St.
3	01 210 14	Sechskantmutter - M8 – DIN 934	2 St.
4	01 180 15	Augenschraube M8x60	1 St.
5	01 180 99	Augenschraube mit Schlitz M8x60	1 St.
6	50 263 15	Rohrüberzug Schaumstoff für Schiebestange SB: ?	1 St.
7	01 152 41	Linsenkopfschraube - M8x30 - ISO 7380	1 St.
8	01 192 22	Sterngriffschraube M8x25	1 St.
9	20 271 10	Klemmteil mit Führung für Griff	2 St.

Stabilisierungsstange in Halter eingehängt

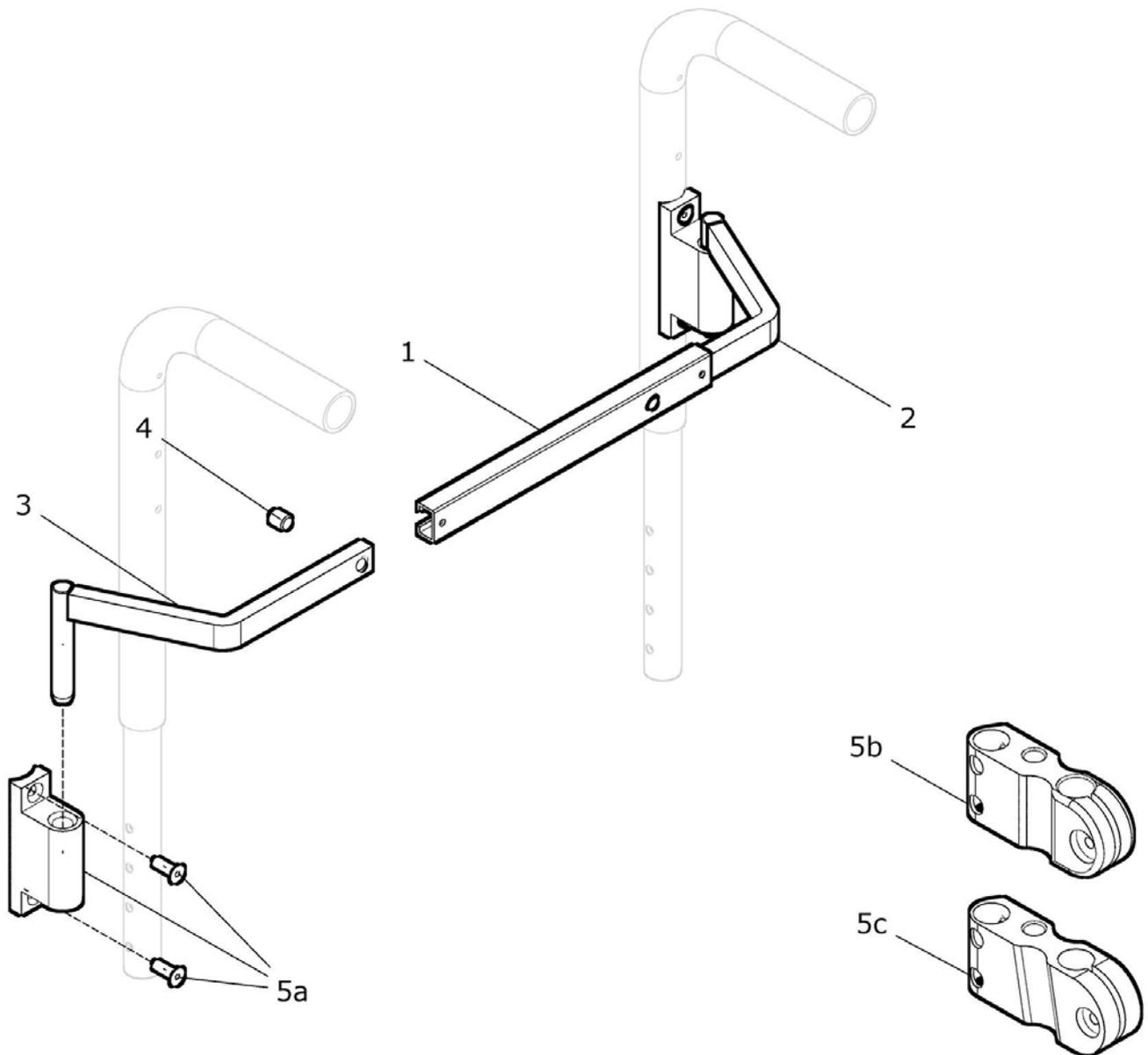

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	50 263 50	Stabilisierungsstange in Halter eingehängt kpl. Querstange-Führungsrohr mit Haken rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a – 5b) SB: ?	1 St.
1 - 4	40 263 50	Stabilisierungsstange in Halter eingehängt UNITOMIC kpl. Querstange-Führungsrohr mit Haken UNITOMIC rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a oder 5c) SB: ?	1 St.
1	50 263 60	Führungsrohr für Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2a	20 262 18	Hacken kurz (rechts) (SB 24-36)	1 St.
2b	40 262 12	Hacken UNITOMIC (rechts)	1 St.
2c	40 262 18	Hacken kurz UNITOMIC (rechts)	1 St.
3a	20 262 19	Hacken kurz (links) (SB 24-36)	1 St.
3b	40 262 13	Hacken UNITOMIC (links)	1 St.
3c	40 262 19	Hacken kurz UNITOMIC (links)	1 St.
4	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
5a	20 262 11	Halter für Stabilisierungsstange standard / UNITOMIC	2 St.
o. Bild	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St.
5b	50 225 56	Schiebegriffhalter lang Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
5c.1	40 225 52	Schiebegriffhalter UNITOMIC rechts f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
5c.2	40 225 53	Schiebegriffhalter UNITOMIC links f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.


Halterung standard für MATRIX-Rückenblech

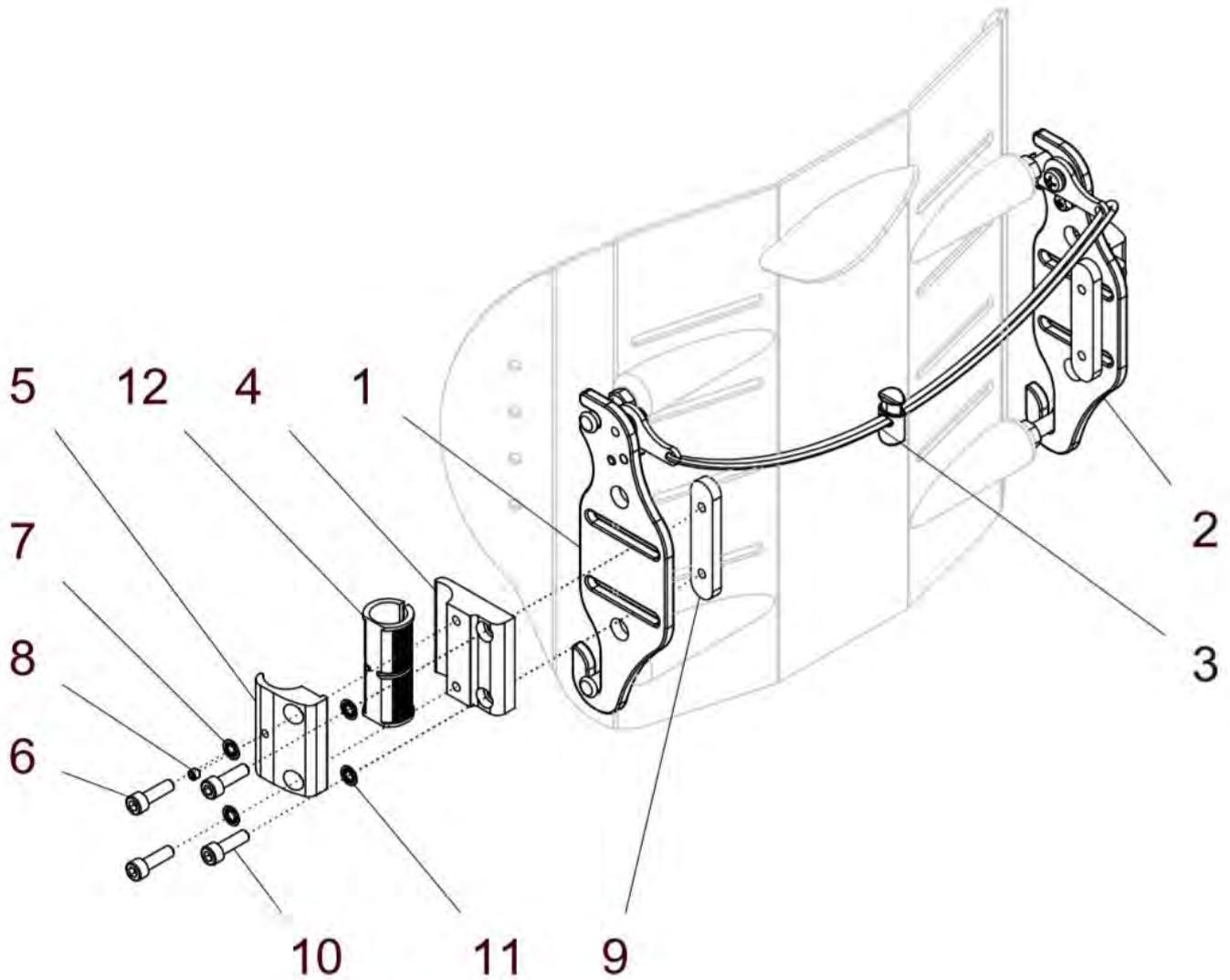

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11 (12)	S50 200 00	Halterung standard für MATRIX-Rücken kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	1 Paar
2, 4 – 11 (12)	S50 200 20	Halterung standard für MATRIX-Rücken rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	1 St.
1, 4 – 11 (12)	S50 200 30	Halterung standard für MATRIX-Rücken links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	β
1	S50 211 30	Aufnahmeplatte Rücken links kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 211 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
4 – 11	S50 212 05	Klemmhalter Ø23 innen / außen kpl. Klemmhalter Ø23 innen und außen und Anschraubstück rechts und links verwendbar	2 Set
4 – 8	S50 212 10	Klemmhalter Ø23 innen / außen (ohne Anschraubstück) kpl. Klemmhalter Ø23 innen und außen rechts und links verwendbar	2 Set
4	S50 212 12	Klemmhalter innen	2 St.
5	S50 212 11	Klemmhalter außen	2 St.
6	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
7	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
8	01 131 09	Gewindestift - M5x5 schwarz – DIN 914	2 St.
9	S50 212 13	Anschraubstück	2 St.
10	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
Optional:			
12	S50 212 15	Distanz-Klemmhülse Ø23/Ø18,7 -optional-	2 St.

Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rückenblech


(Sonderhalterung)

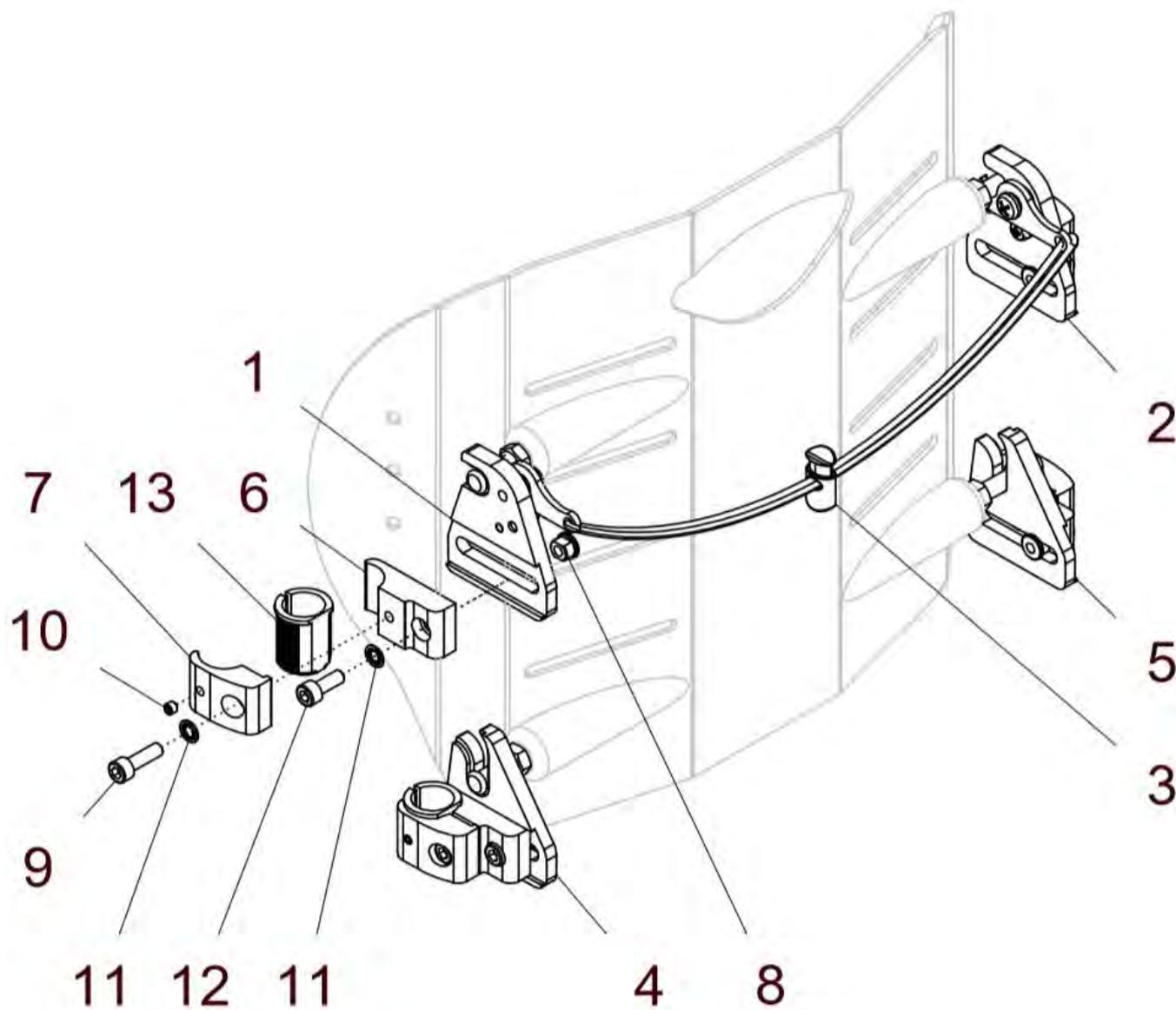

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	S50 300 00	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken kpl. mit Aufnahmeplatten und 2-teiliger Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 Paar
2, 5, 6 – 13	S50 300 20	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1, 4, 6 – 13	S50 300 30	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
2, 6 – 13	S50 310 20	Halterung geteilt oben rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1, 6 – 13	S50 310 30	Halterung geteilt oben links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1	S50 311 30	Aufnahmeplatte Rücken links oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 311 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
5, 6 – 13	S50 310 40	Halterung geteilt unten rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
4, 6 – 13	S50 310 50	Halterung geteilt unten links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
4	S50 311 51	Aufnahmeplatte Rücken links unten	1 St.
5	S50 311 41	Aufnahmeplatte Rücken rechts unten	1 St.
6 – 12	S50 311 10	Klemmhalter Ø23 innen/ außen schmal kpl. rechts und links / oben und unten verwendbar	4 Set
6	S50 311 12	Klemmhalter innen schmal	4 St.
7	S50 311 11	Klemmhalter außen schmal	4 St.
8	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
9	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
10	01 131 09	Gewindestift - M5x5 schwarz – DIN 914	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
12	01 162 17	Zylinderkopfschraube – M6x16 schwarz – DIN 912	4 St.


6 – 13	S50 311 15	Klemmhalter Ø18,7 innen/ außen schmal kpl. rechts und links / oben und unten verwendbar	4 Set
optional:			
13	S50 311 16	Distanz-Klemmhülse halbiert Ø23/Ø18,7 für Halterung geteilt	4 St.

Matrix-Aktiv Rücken

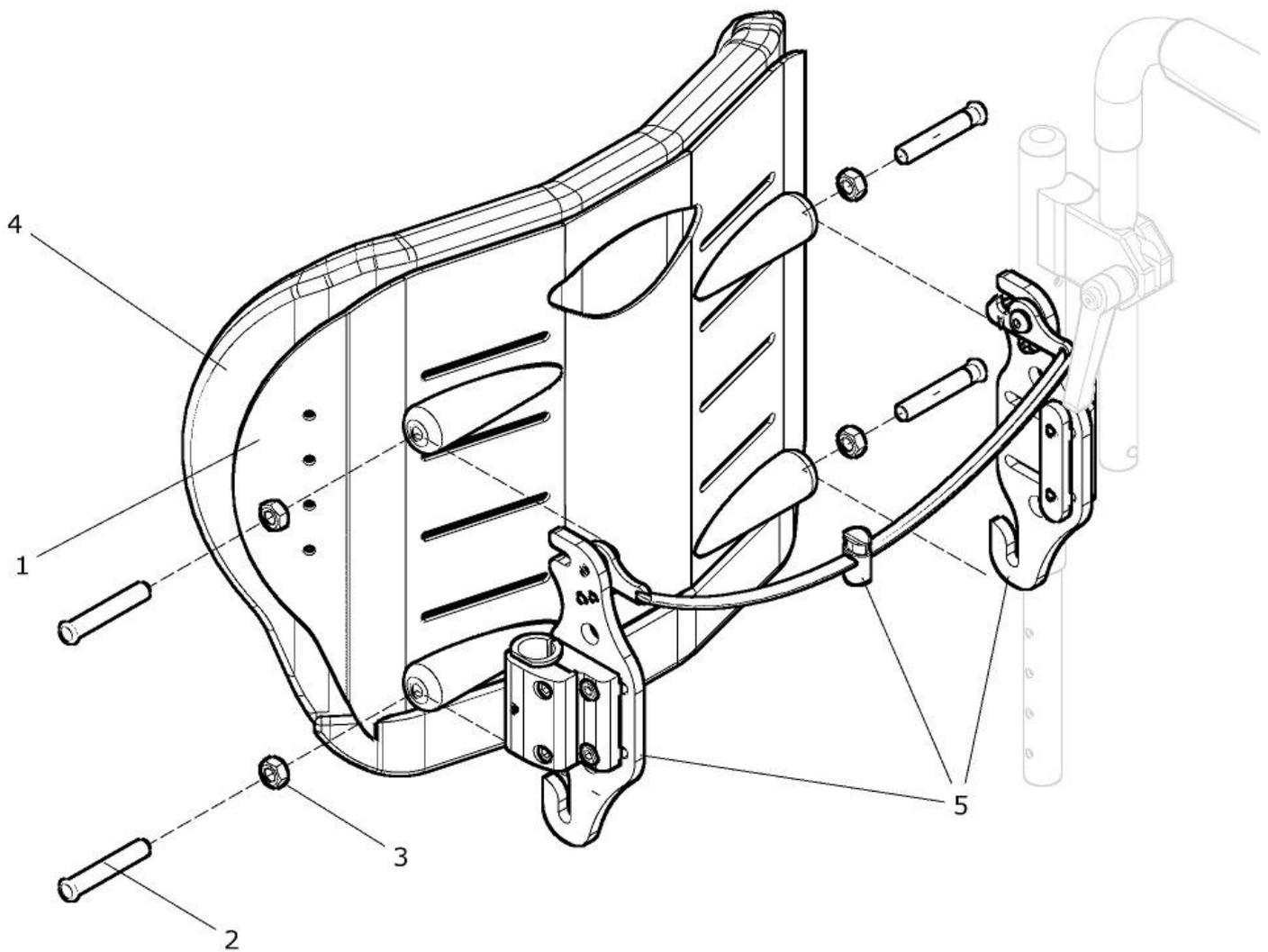

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	S51 200 00	<p>MATRIX-Aktiv Rücken mit Rückenpolster und Halterung kpl. und mit Aufnahmeplatte und Klemmhalter</p> <p>Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ?</p> <p>SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50) Halterung: ? (standard S502HALT / geteilt S503HALT)</p> <p>Halterung siehe Artikel-Nr. S502HALT oder S503HALT</p>	1 St.
1 – 3	S51 400 00	<p>MATRIX-Aktiv Rückenblech ohne Polster / ohne Halterung kpl.</p> <p>Rückenblech mit Gewindebolzen und Mutter (ohne Rückenpolster / ohne Halterung)</p> <p>SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)</p>	1 St.
1	S51 800 00	<p>Rückenblech MATRIX-Aktiv- schwarz pulverbeschichtet (ohne Gewindebolzen und Mutter)</p> <p>SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)</p>	1 St.
2	S51 101 01	Gewindebolzen M8x1	4 St.
3	01 212 54	Mutter - M8x1 - DIN 934 schwarz vz.	4 St.
4	S51 700 00	<p>MATRIX-Aktiv Rückenpolster atmungsaktiv</p> <p>Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ?</p> <p>SB: ? (32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50) RH: ? (25, 30, 40, 50)</p>	1 St.
5	S502HALT	<p>Halterung standard MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.</p> <p>Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! Ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung standard S50 200 00</p>	1 Paar
	Sonderhalterung:		
o. Bild	S503HALT	<p>Halterung geteilt (2-teilig) MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl.</p> <p>Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung geteilt S50 300 00</p>	1 Paar


Kopfstütze für Matrix-Aktiv Rücken

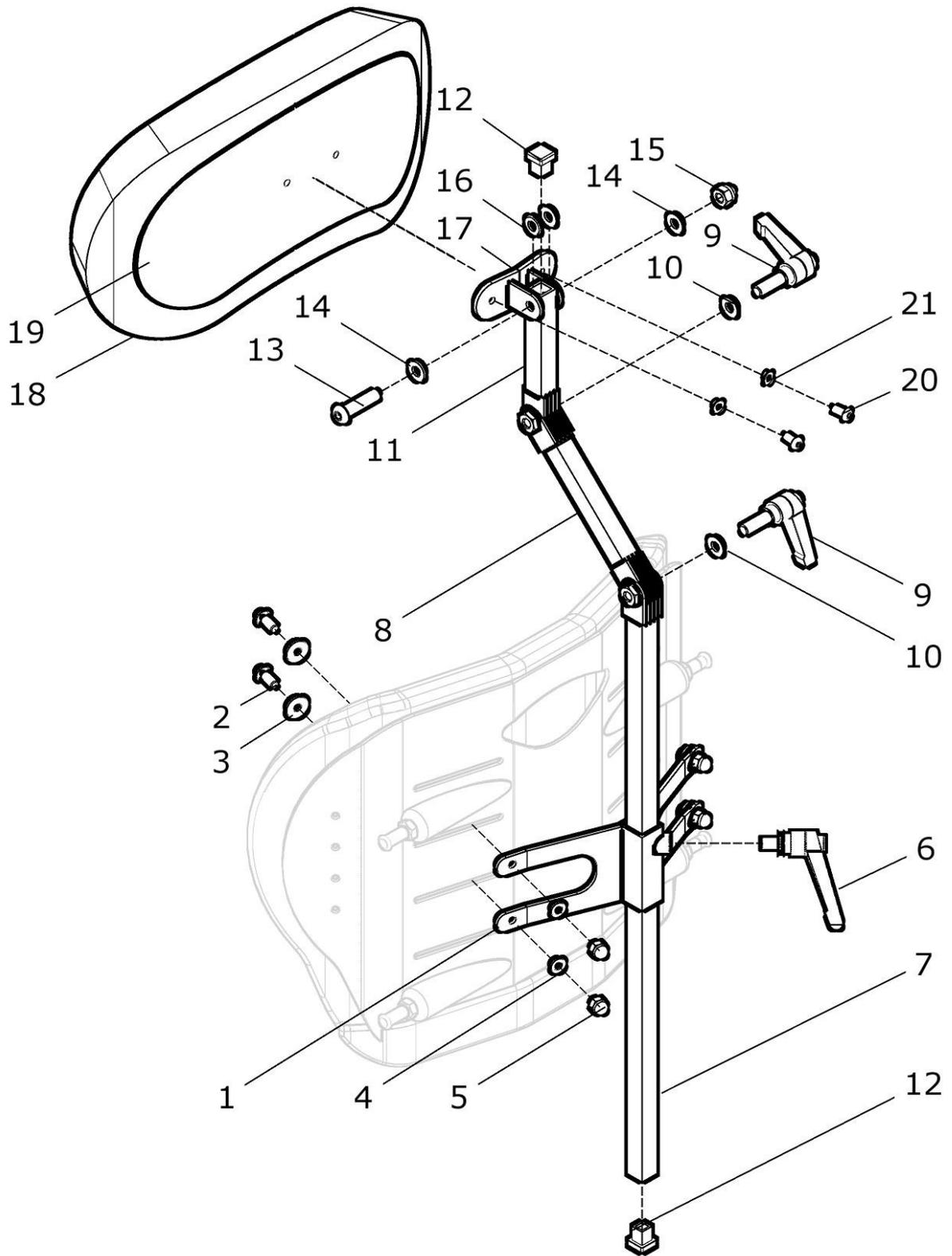

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	S51 320 00	Kopfstütze mit Bezug und Halterung für Matrix-Aktiv kpl. mit Kopfstützenhalter winkelvestellbar mit 2 Gelenken SB: ? (bzw. Halterung: ?)	1 Set
1 - 6	S51 321 09	Adapter für Kopfstütze für Matrix-Aktiv-Rücken kpl. SB: ? (bzw. Halterung: ?)	1 St.
1a	S51 321 11	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 32-40	1 St.
1b	S51 321 12	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 42-50	1 St.
2	01 153 20	Linsenschraube M6x14 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
6	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
7 - 16	20 262 45	Kopfstützenhalter winkelvestellbar mit 2 Gelenk - 300mm kpl. (ohne Kopfstütze Muschelform / ohne Halter Kopfstützenschale)	1 St.
7	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm	1 St.
8	20 262 41	Gelenkzwischenstück für Kopfstützenträger	1 St.
9	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
10	01 322 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
11	20 262 25	Kopfstütze Halterstück	1 St.
12	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
13	01 154 42	Linsenschraube M8x35 - ISO 7380 ZNS	1 St.
14	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
15	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 ZNS	1 St.
16	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
17, 18a - 21	20 262 20	Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.	1 St.
17	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
18a	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
19a	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
20	01 156 54	Linsenschraube M5x12 - ISO 7380F ZNS	2 St.
21	01 320 61	Scheibe 5,3 - DIN 125 ZNS	2 St.


17, 18b – 21	20 262 50	Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.	1 St.
18b	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
19b	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.

Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken

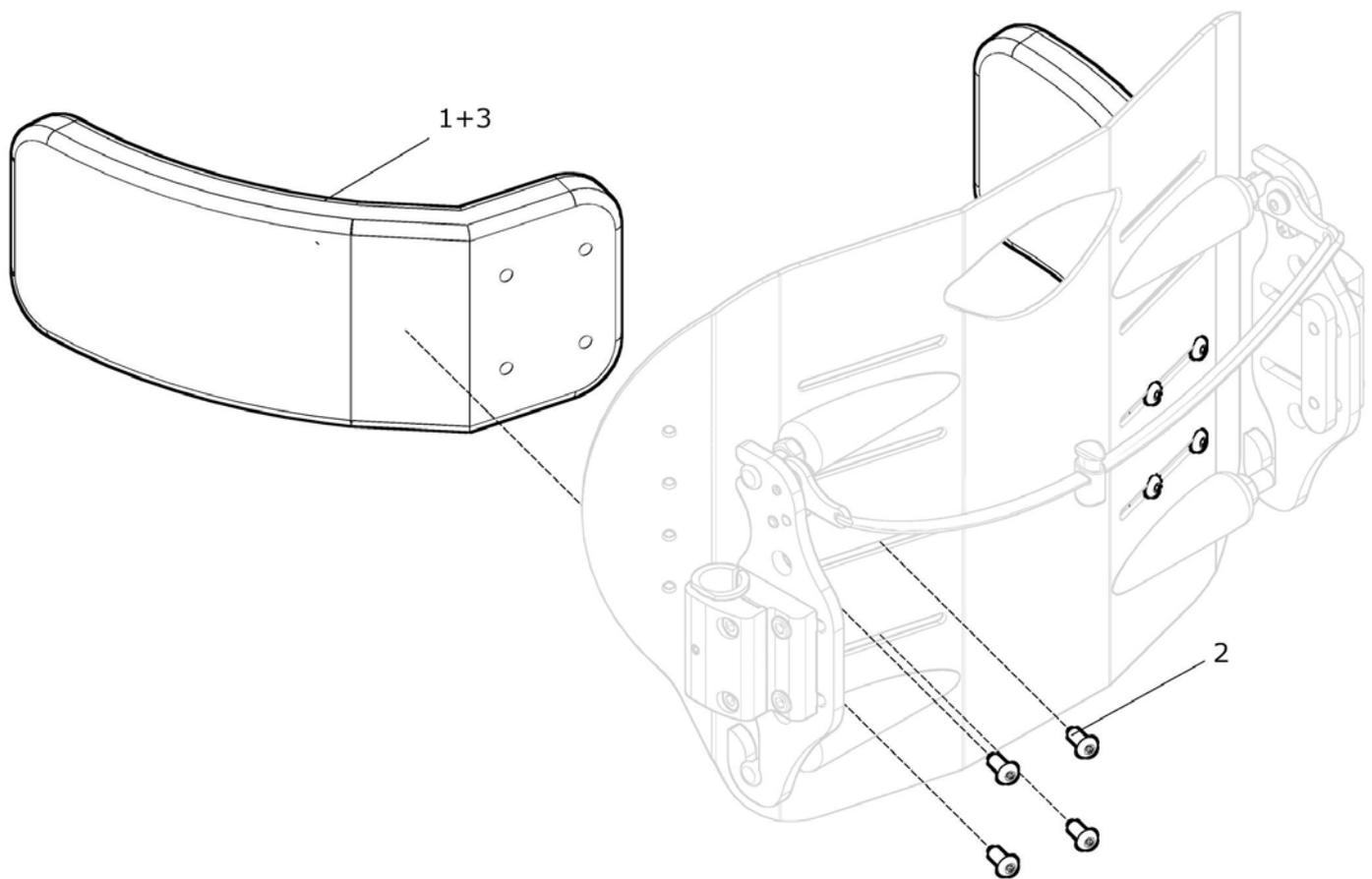

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	S51 301 01	Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)	1 Paar
1	S51 311 00	Seitenpelotte gerade (ohne Bezug)	2 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3	S51 311 81	Bezug Seitenpelotte gerade (rechts / links verwendbar) FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	2 St.

Seitenpelotten abgekröpft für Matrix-Aktiv Rücken

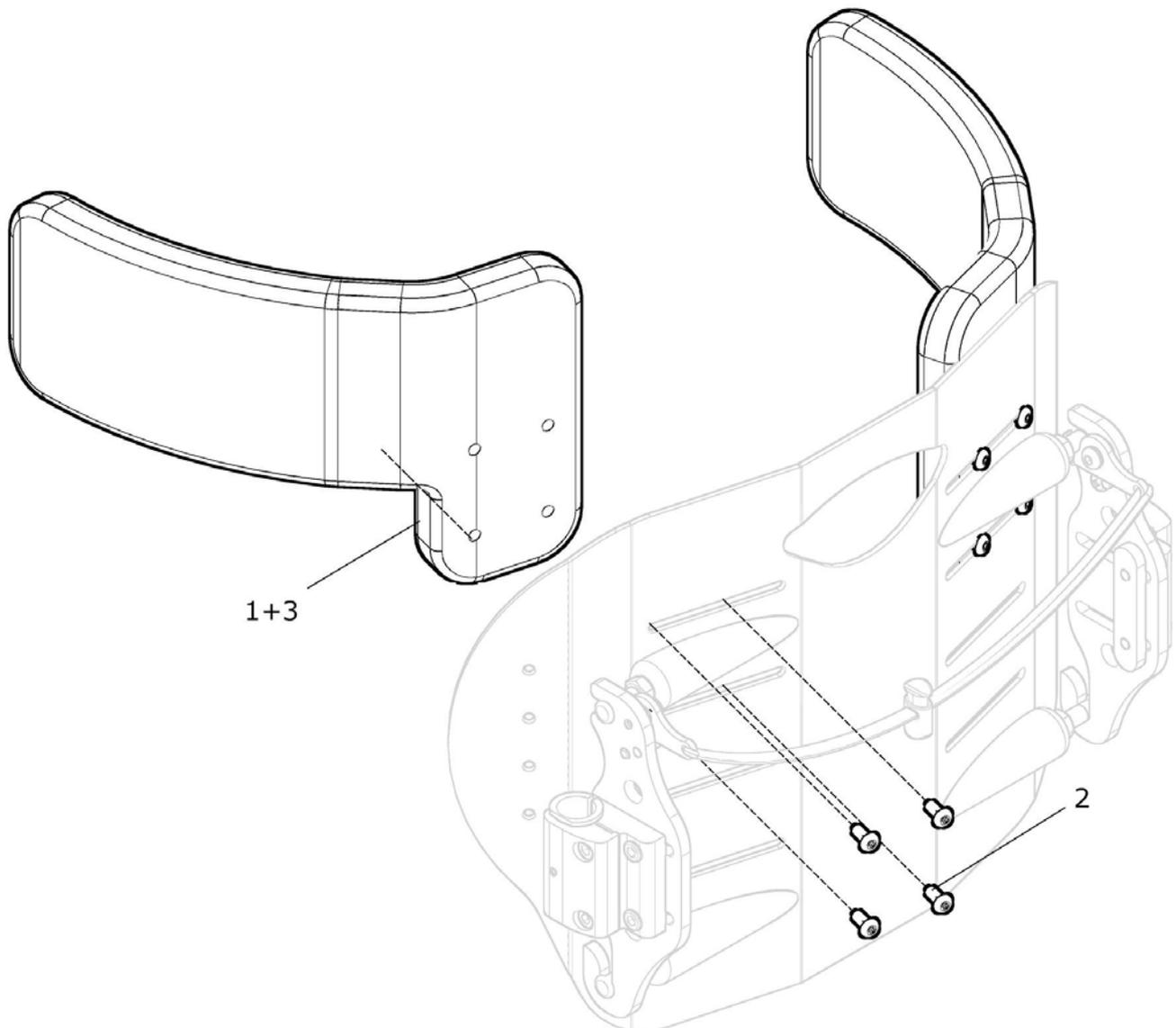


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	S51 312 00	Seitenpelotten abgekröpft rechts / links Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (rechts = nach oben versetzt) (links = nach oben versetzt)	1 Paar
1a – 3a	S51 312 02	Seitenpelotten abgekröpft rechts für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (rechts = nach oben versetzt)	1 St.
1b – 3b	S51 312 03	Seitenpelotten abgekröpft links für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (links = nach oben versetzt)	1 St.
1a	S51 312 20	Seitenpelotte abgekröpft rechts (ohne Bezug)	1 St.
1b	S51 312 30	Seitenpelotte abgekröpft links (ohne Bezug)	1 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3a	S51 311 28	Bezug Seitenpelotte abgekröpft rechts FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.
3b	S51 311 38	Bezug Seitenpelotte abgekröpft links FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.

Hinweis:

Die Seitenpelotten rechts und links können auch vertauscht werden (=> nach unten versetzt) !!


Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken

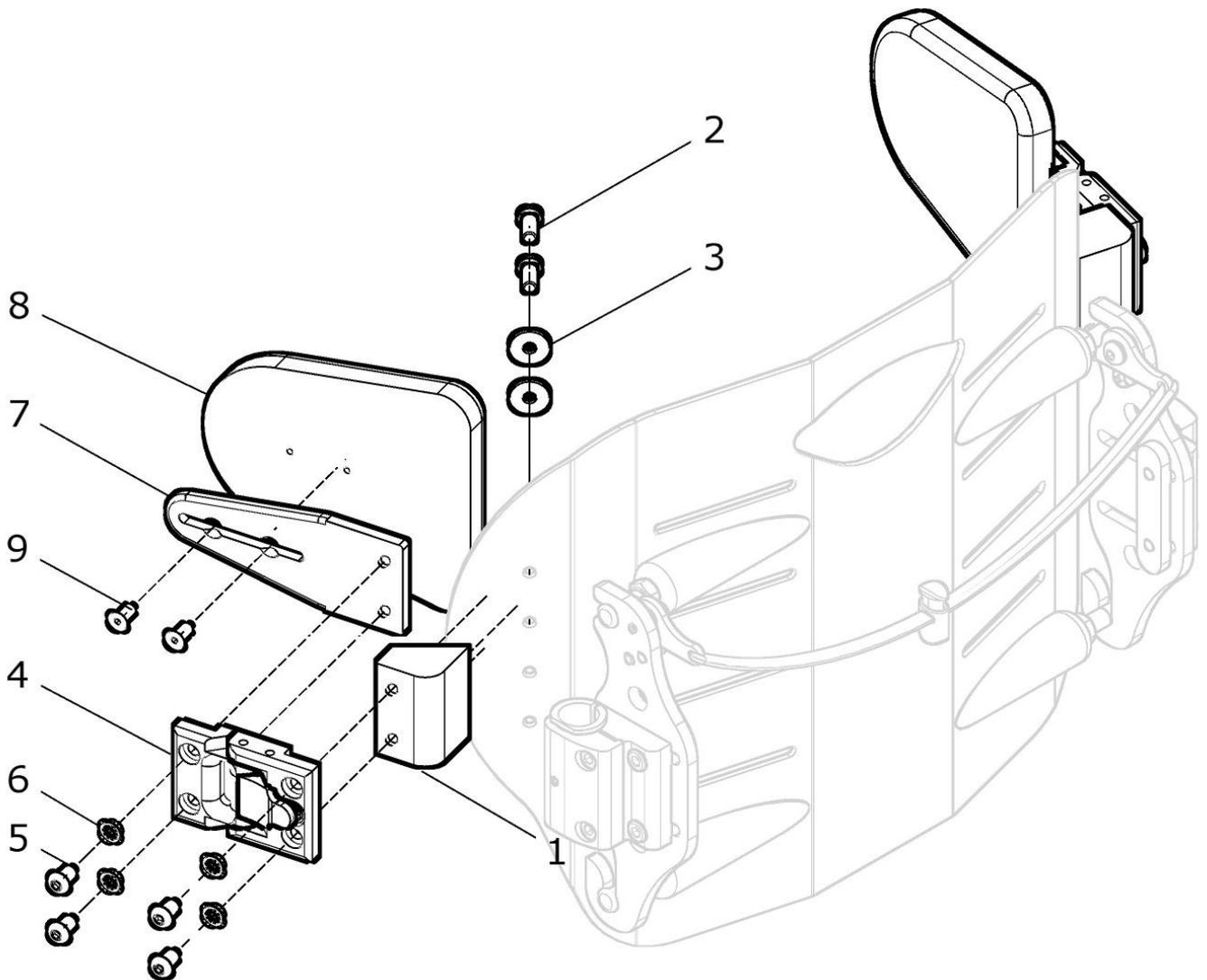

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	S51 331 00	Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Gelenk flach Größe Pelotten: 1 oder 2 ?	1 Paar
1	S50 501 12	Verbindungsteil für Seitenpelotte abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken	2 St.
2	01 152 21	Linsenschraube M6x16 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	S10 501 20	Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar	2 St.
5	01 154 19	Linsenschraube M6x10 schwarz - ISO 7380	8 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	S10 501 41	Pelottenschiene gerade Pelottenhalter flach	2 St.
8a	S10 402 10	Seitenpelotten standard Gr. 1 mit Bezug (bis SB 36) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
8b	S10 403 10	Seitenpelotten standard Gr. 2 mit Bezug (ab SB 38) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
9	01 120 02	Senkschraube M5x12 - DIN 7991	4 St.

Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken

(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)

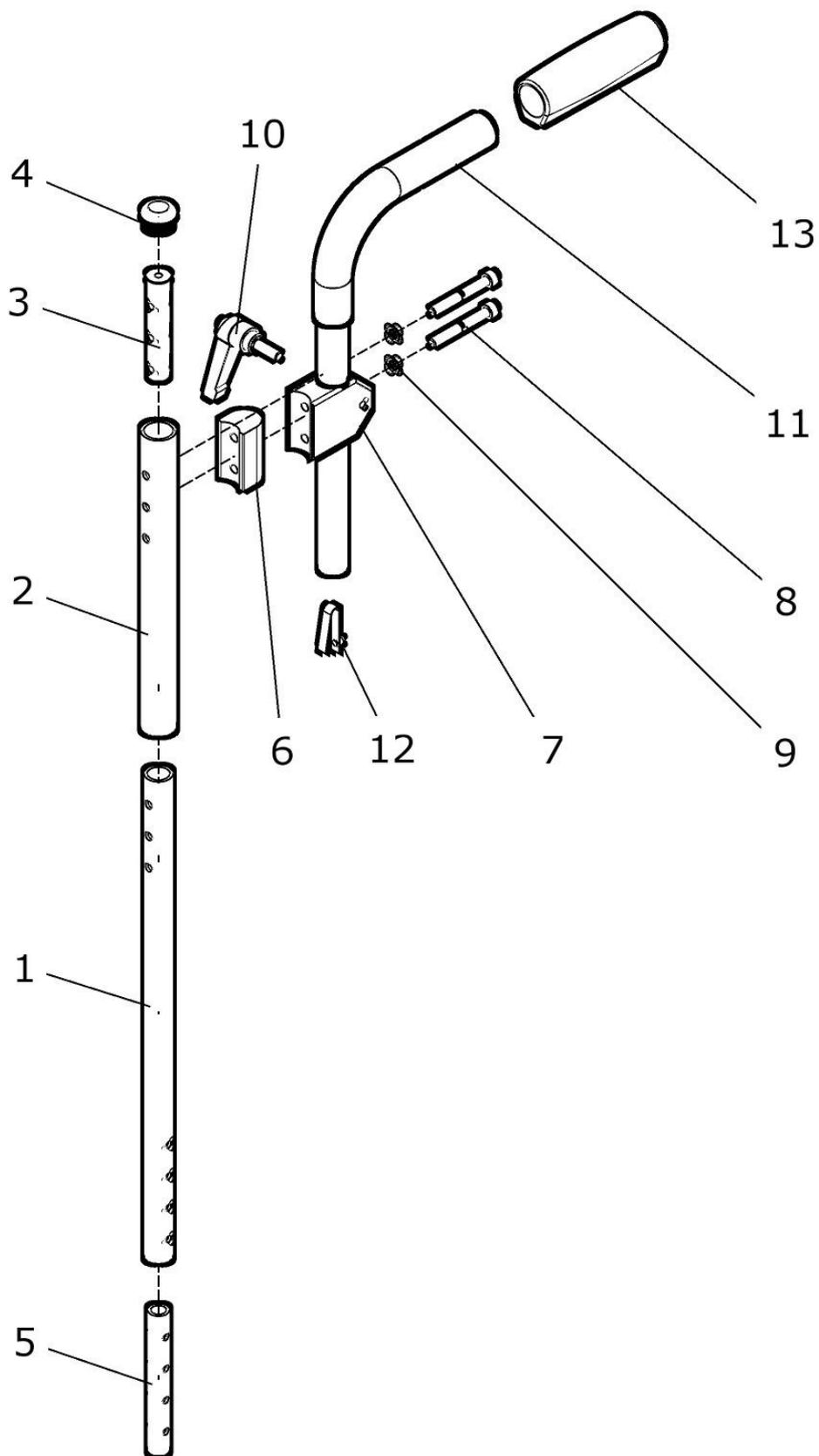

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	50 228 00	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	1 Paar
1 – 10	50 228 20	Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1 – 10	50 228 30	Rückenrohr links für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1a	50 228 52	Rückenrohr Matrix innen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1b	50 228 53	Rückenrohr Matrix innen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1c	50 228 54	Rückenrohr Matrix innen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1d	50 228 55	Rückenrohr Matrix innen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr	2 St.
6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a – 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b – 13	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11c – 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11d - 13	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.


11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.

Verstärkte Version:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	50 228 05	Rückenrohr <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre verstärkt (Stahl) mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	1 Paar
1 - 10	50 228 25	Rückenrohr rechts <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1 - 10	50 228 35	Rückenrohr links <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1e	50 228 52	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 30 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1f	50 228 53	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 35 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1g	50 228 54	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 40 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1h	50 228 55	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 45 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr # nicht bei verstärkter Version #	

6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a – 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b – 13	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11c – 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11d - 13	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.


**Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken
bei 30° - Rücken Gasdruckfeder**

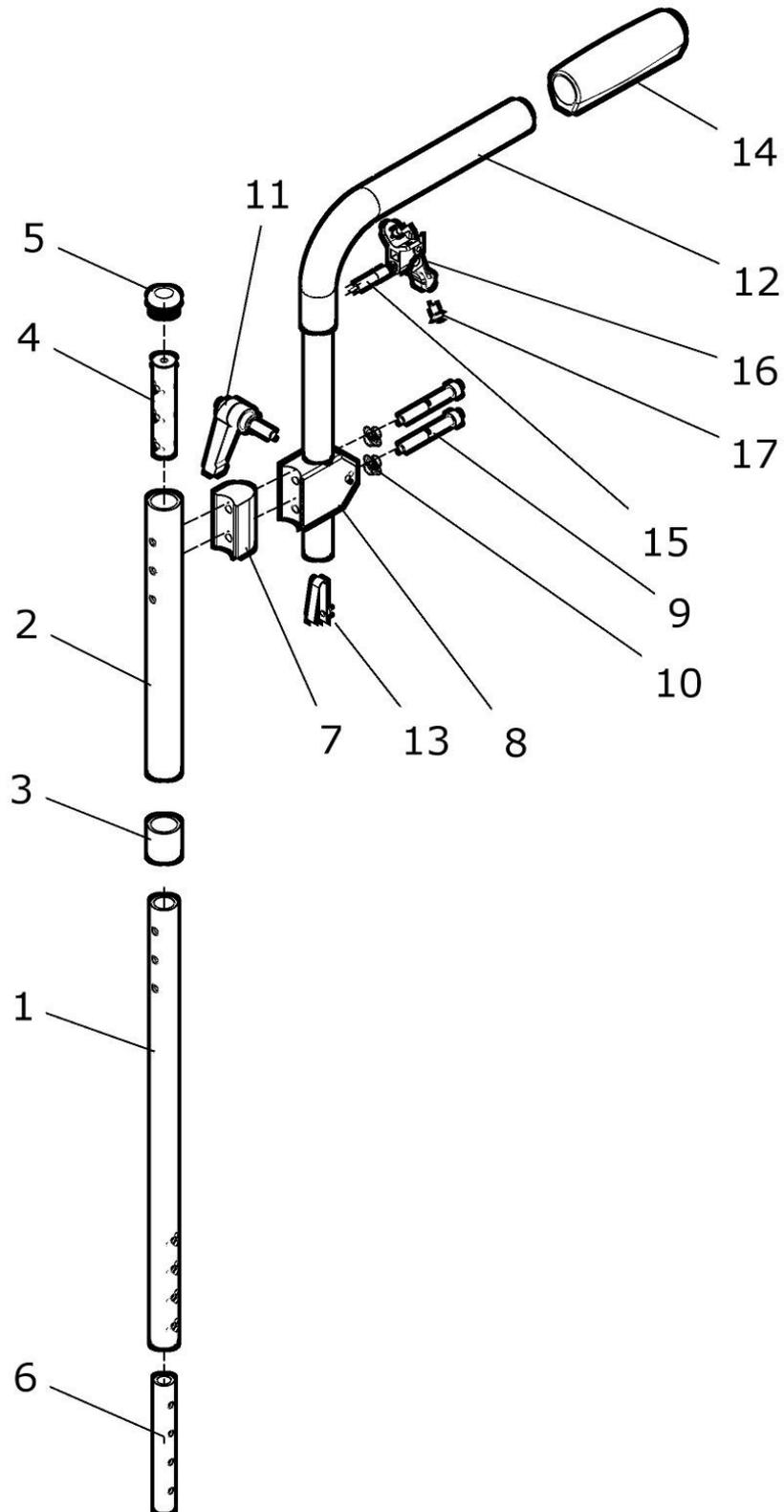

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	50 260 85	Rückenrohr-Set 30°-Rücken für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre Sch.gr. höhenverstellbar mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken, mit Schiebegriffe höhenverstellbar bei 30°-Rücken Gasdruckfeder RH bei 30°-Rücken: ? Tr.br.: ?	1 Paar
1	50 261 94	Rückenrohr innen für Schiebegriffe höhenverstellbar bei 30°-Rücken mit Matrix-Rücken RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
2	50 261 95	Rückenrohr außen für Schiebegriff höhenverstellbar bei 30°-Rücken mit Matrix-Rücken RH bei 30°-Rücken: ?	2 St.
3	50 261 05	Hülse für 30° Rücken	2 St.
4	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
5	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
6	50 122 09	Verstärkungsrohr	2 St.
7	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
8	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
9	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
10	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
11	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
12a	50 261 86	Schiebegriff 30°-Rücken rechts höhenverstellbar (150mm höhenverstellbar)	1 St.
12b	50 261 87	Schiebegriff 30°-Rücken links höhenverstellbar (150mm höhenverstellbar)	1 St.
13	02 320 01	Stativfeder	2 St.
14	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.
15 – 17	50 261 45	Bowdenzug für 30°-Rücken mit Hebel kpl. RH: ? Rückenrohr: ?	2 Set
15a	50 261 41	Bowdenzug für 30°-Rücken RH40 stand.	2 St.
15b	50 261 42	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 stand. / RH40 Schgr. höhenv.	2 St.
15c	50 261 43	Bowdenzug für 30°-Rücken RH45 Schgr. höhenv.	2 St.
16	05 401 10	Hebel und Abstützung	2 St.
17	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	4 St.


Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken bei Rücken mit Zahnsegmenten

(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)

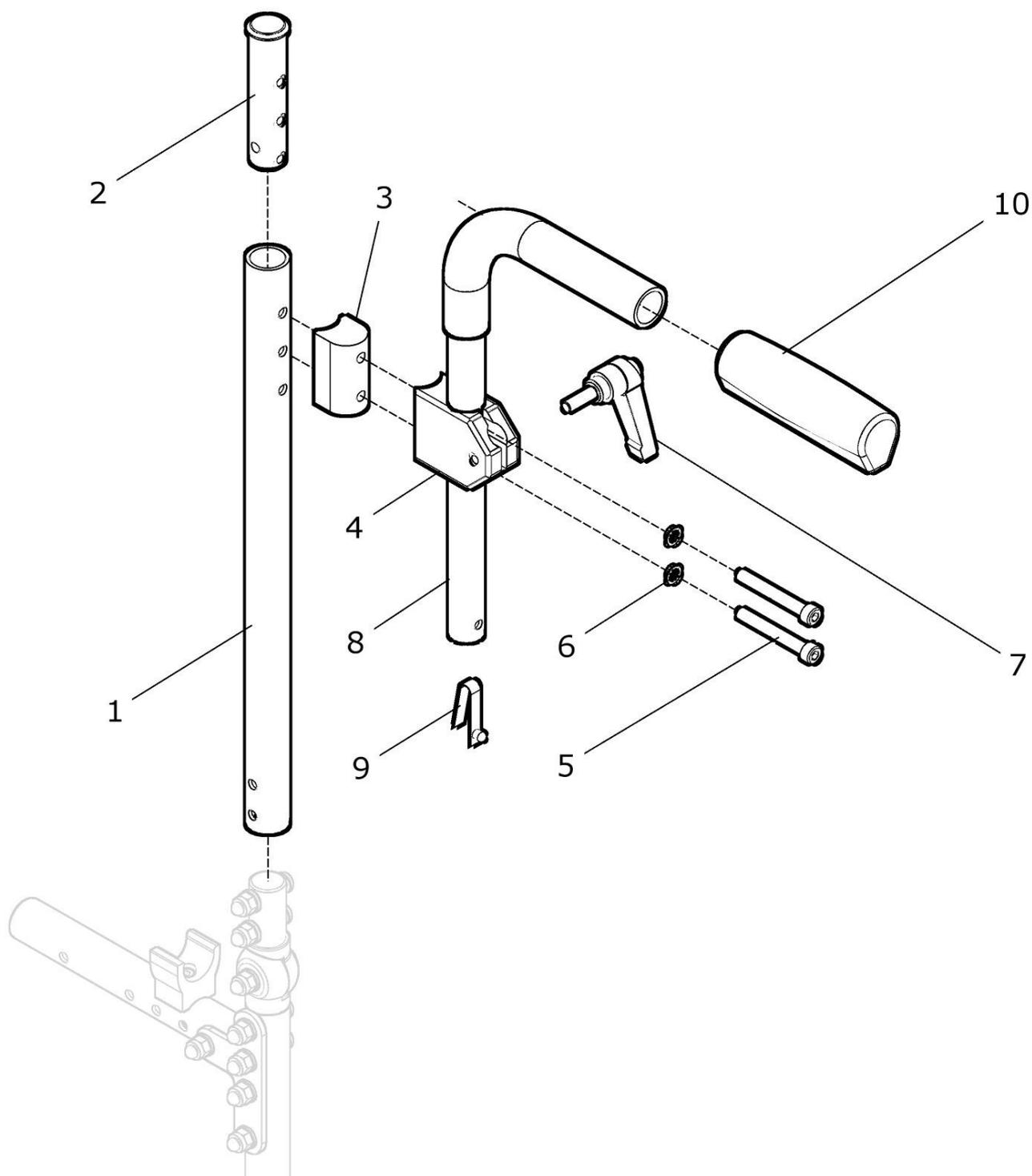


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	50 229 00	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	1 Paar
1 – 7	50 229 20	Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1 – 7	50 229 30	Rückenrohr links für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1	50 229 40	Rückenrohr Matrix außen RH .. ? bei Schiebegriffe höhenverstellbar und Zahnsegmente (RH 30 / 35 / 35 / 45)	2 St.
2	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter	2 St.
3	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
4	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
5	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
7	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
8a – 10	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8b – 10	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8c – 10	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8d - 10	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
9	02 320 01	Stativfeder	2 St.
10	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.

Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - mit Clips

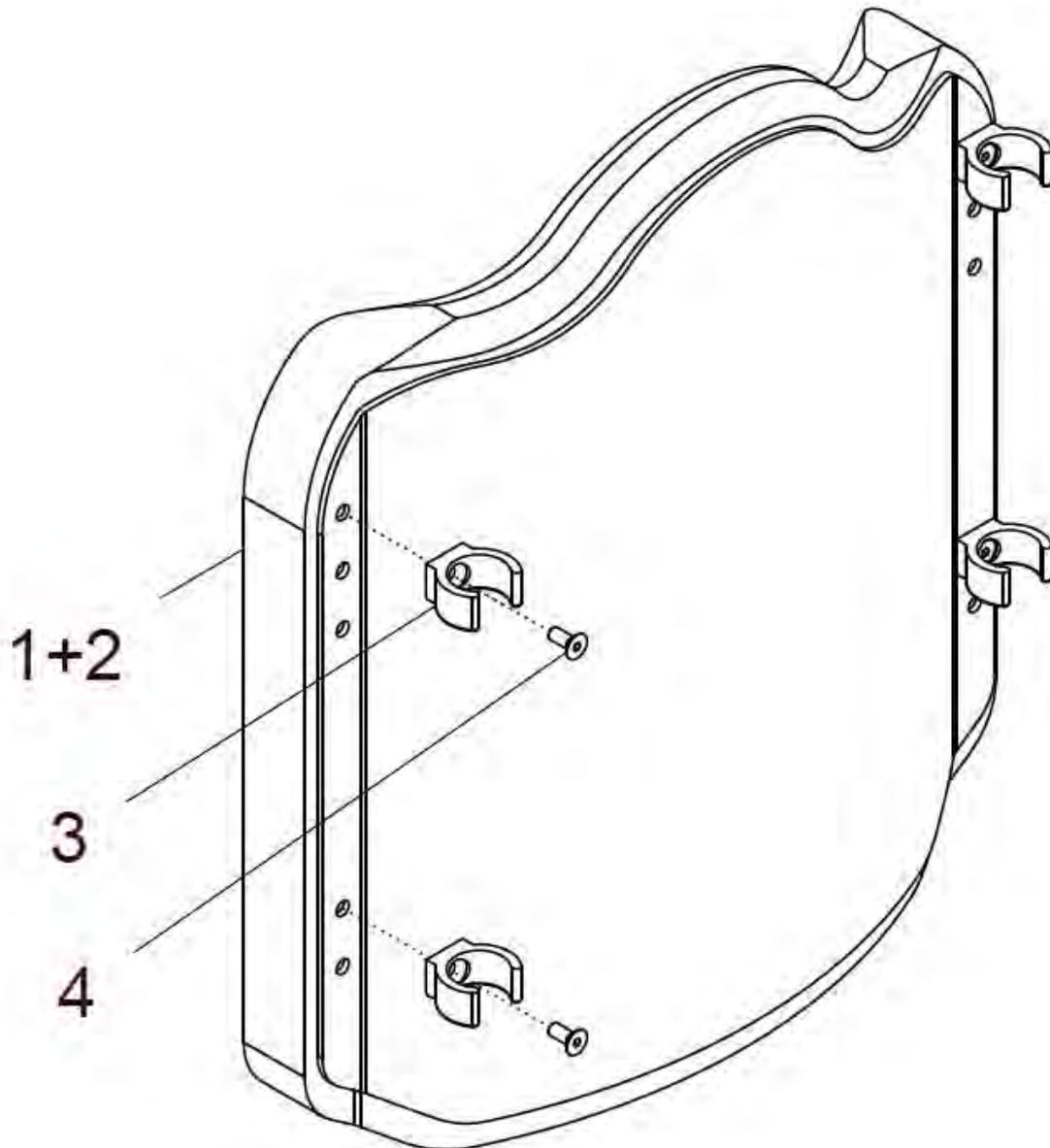

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a – 4	25 230 60	Rücken FIDIBUS 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1b, 2b – 4	25 230 65	Rücken FIDIBUS 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1a	25 231 60	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 (für Clips) Rückenblech 30mm gemuldet (ohne Bezug) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
1b	25 231 65	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 (für Clips) Rückenblech 50mm gemuldet (ohne Bezug) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
2a	25 231 81	Bezug für Rücken FIDIBUS 30 angeschraubt SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 231 86	Bezug für Rücken FIDIBUS 50 angeschraubt SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
3a	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 25cm)	2 St.
3b	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 30 - 40cm)	4 St.
4a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 25cm)	2 St.
4b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 30 – 40cm)	4 St.

Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS-ASR - mit Clips

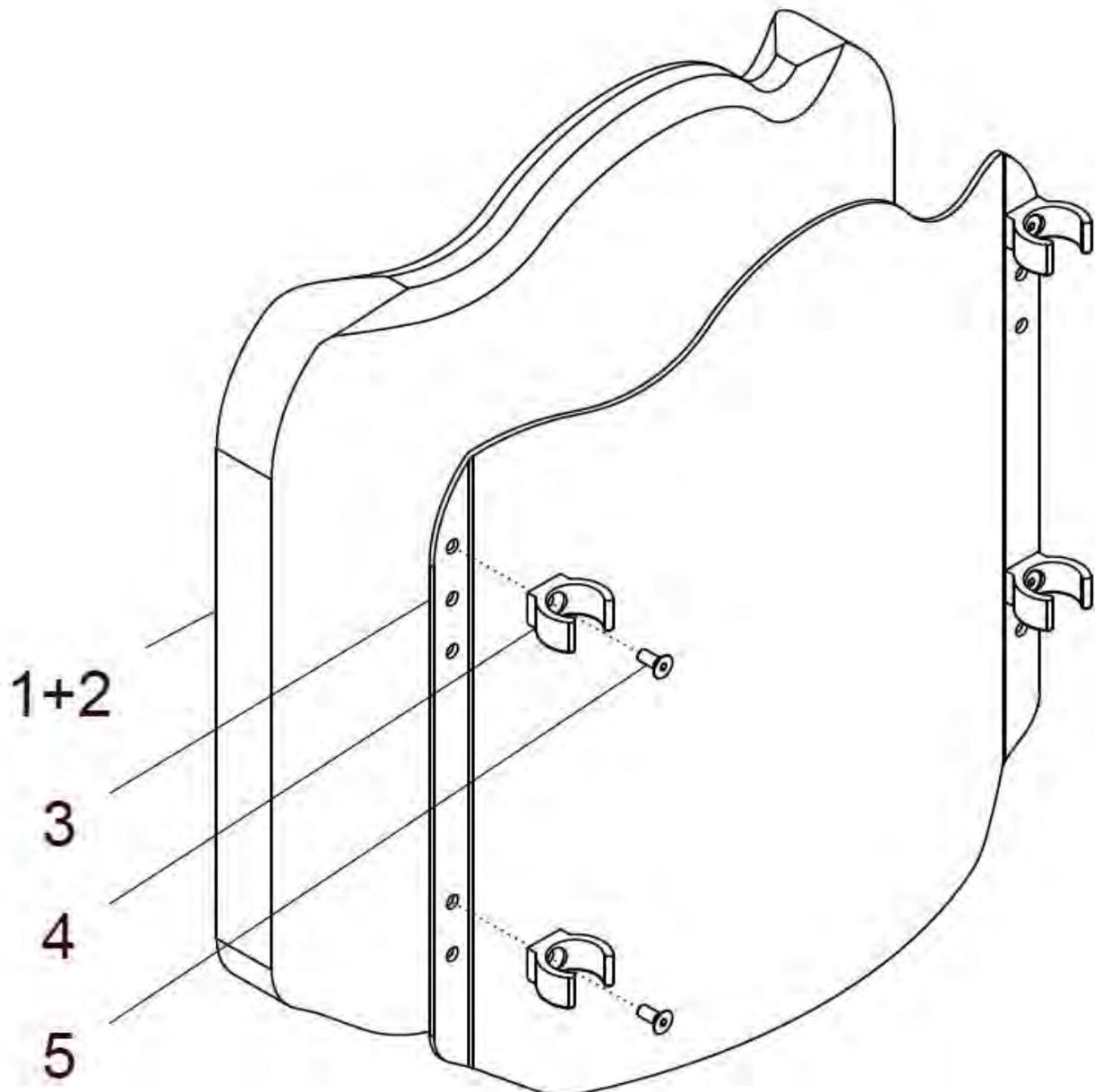


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a 3 – 5	25 236 30	Rücken FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 30 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1b, 2b, 3 – 5	25 238 30	Rücken FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 50 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1a, 2a	25 236 50	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 mit Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1b, 2b	25 238 50	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 mit Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1a	25 236 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR 30 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
1b	25 238 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR 50 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
2a	25 236 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 238 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
3a - 5	25 236 35	Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle Rückenblech pulverbeschichtet (30mm gemuldet) mit Clips (ohne Polster) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.


3b - 5	25 238 35	Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle Rückenblech pulverbeschichtet (50mm gemuldet) mit Clips (ohne Polster) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3a	25 236 96	Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 für Faltrollstühle (für Clips) Rückenblech pulverbeschichtet (30mm gemuldet) (ohne Polster / ohne Clips) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3b	25 238 96	Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 für Faltrollstühle (für Clips) Rückenblech pulverbeschichtet (50mm gemuldet) (ohne Polster / ohne Clips) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3a	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 25cm)	2 St.
3b	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 30 - 40cm)	4 St.
4a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 25cm)	2 St.
4b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 30 – 40cm)	4 St.

Sitz

Gruppe 3

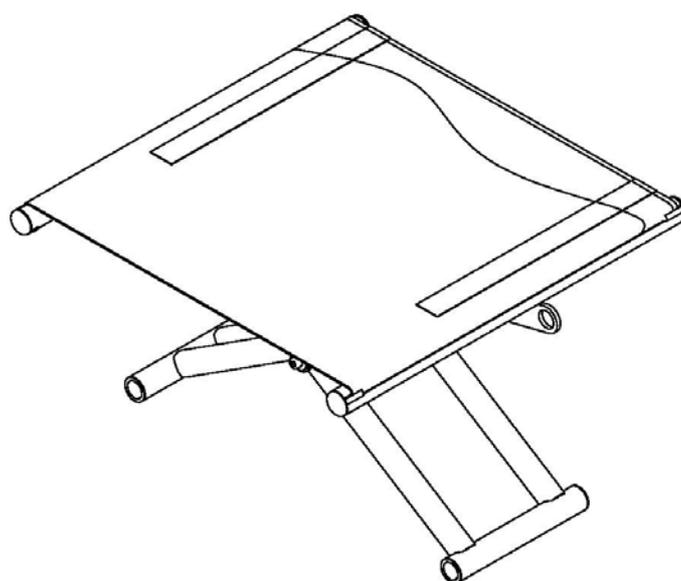


Sitz (Sitzbespannung und Kreuzstrebe)

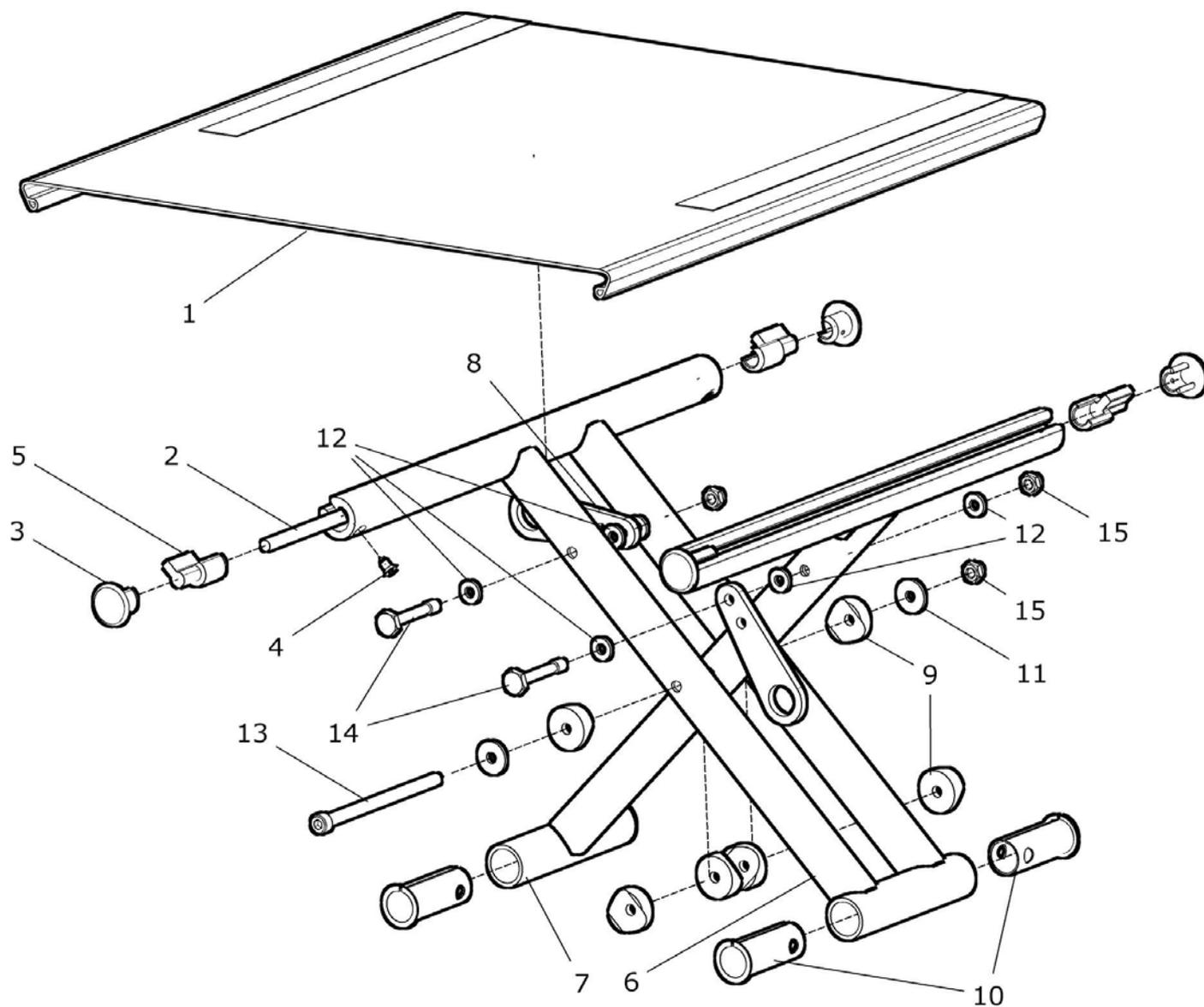


7a	22 323 00	Kreuzstrebe SLT links SB 24–36 / ST 26–38 (Kreuzrohre einfach) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
7b	22 323 60	Kreuzstrebe AR links SB 24–36 / ST 26–38 (Kreuzrohre einfach) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
8a	22 321 03	Kreuzstrebenlasche SB 24 / 28	2 St.
8b	22 321 02	Kreuzstrebenlasche SB 26 / 30	2 St.
8b	22 321 01	Kreuzstrebenlasche SB 32	2 St.
8d	50 321 01	Kreuzstrebenlasche SB 34 - 36	2 St.
9	50 321 11	Halbschale 6,2 für Kreuzstrebe	6 St.
10	50 321 16	Buchse lang	4 St.
11	01 321 02	Scheibe 6,4 - DIN 9021	2 St.
12	01 310 02	Scheibe 6,4 PE – DIN 125	6 St.
13	01 160 32	Zylinderschraube M6x100 - DIN 912	1 St.
14	01 112 36	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	2 St.
15	01 210 33	Sechskantmutter M6 - DIN 985	3 St.

Sitzblech mit KU-Clips

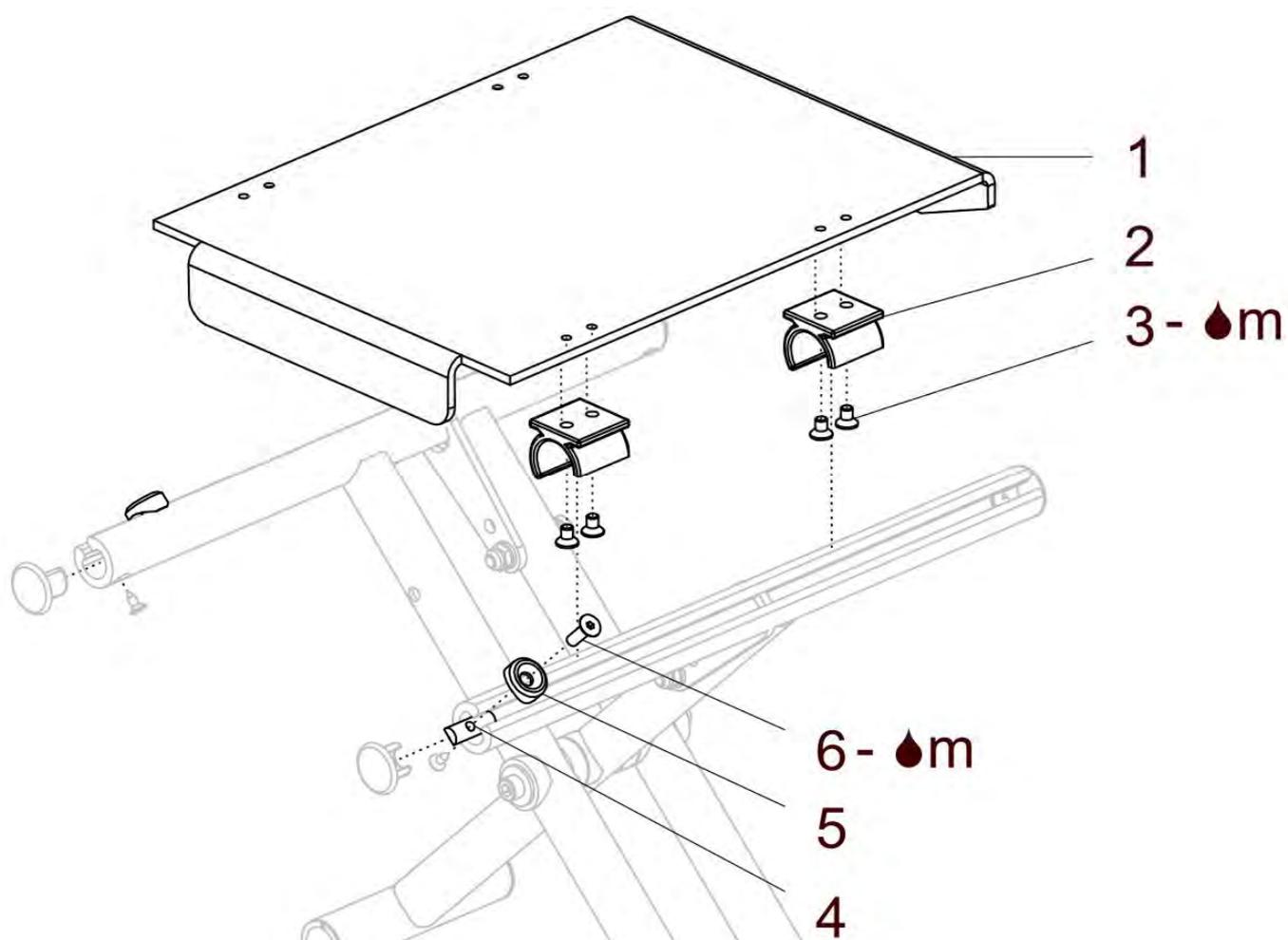

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	20 311 50	Sitzblech mit KU-Clips Junior2 / Little SB... / ST... kpl. Sitzblech mit Fixierung durch KU-Clips SB: ? (SB 24cm – 36cm) ST: ? (ST 26cm – 38cm) FM: ?	1 St.
1	20 311 60	Sitzblech für KU-Clips SB: ? (SB 24cm – 36cm) ST: ? (ST 26cm – 38cm) FM: ?	1 St.
2	20 311 59	Clip für C-Profilrohr ø23	4 St.
3	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	8 St.
		optional:	
4 – 6	20 311 80	Fixierung Sitzblech kpl. Fixierung mit Nutenstein Hinweis: Bedarf eventuell bei Junior2 AR, wenn das Sitzrohr der Kreuzstrebe länger ist wie die Sitzplatte bzw. die Sitztiefe	2 St.
4	20 311 81	Nutenstein kurz (zum Fixieren des Sitzbleches)	2 St.
5	45 111 01	Halbschale ø6,2 / ø18 ALU schwarz	2 St.
6	01 120 82F	Senkschraube M5x16 - DIN 7991 ZNS schwarz	2 St.

Sitzkissen

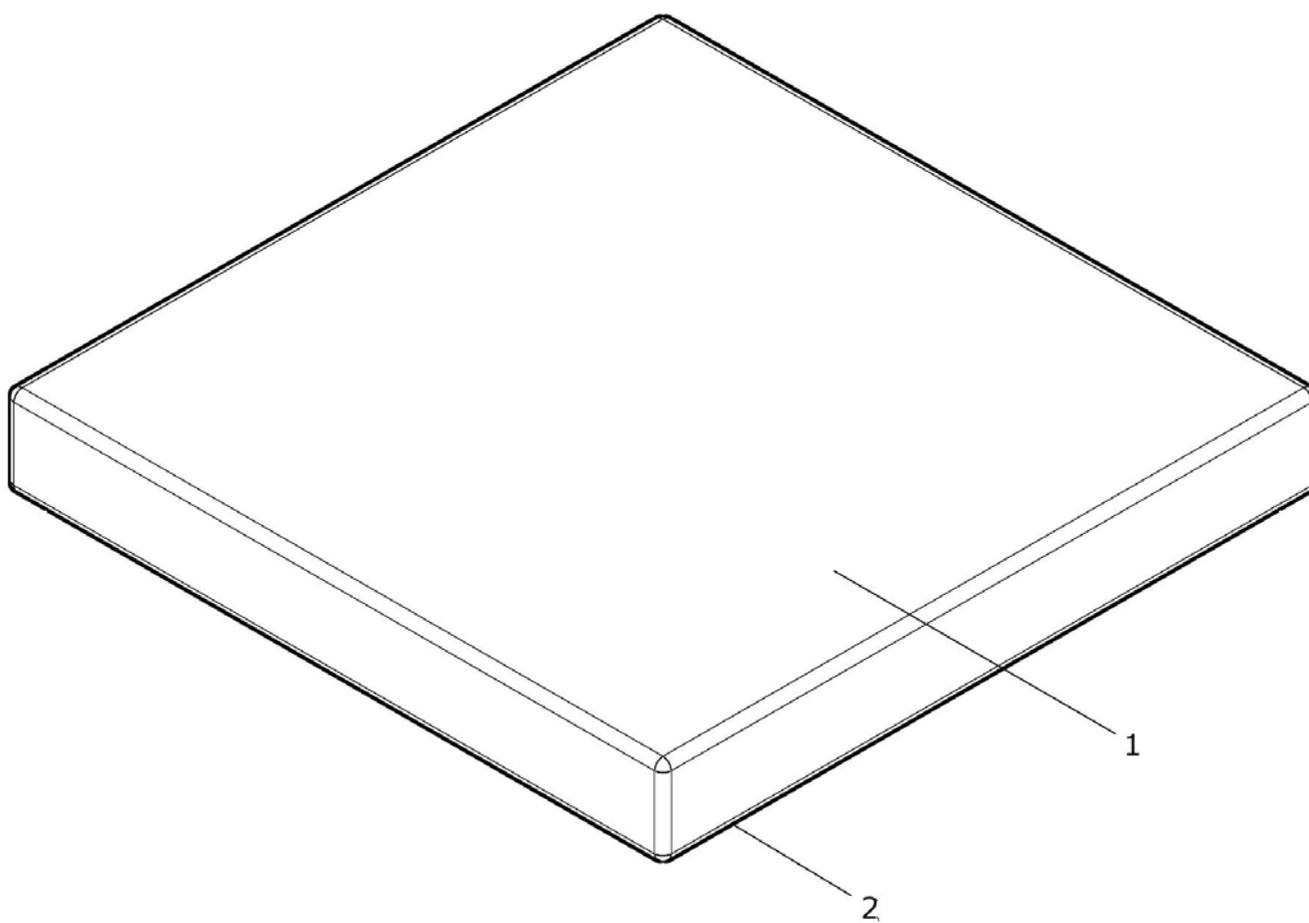


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2a	50 393 00	Sitzkissen schwarz 3cm kpl. SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 393 01	Sitzkissen-Verbundschaum 3cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2a	50 393 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2b	45 393 00	Sitzkissen 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2b	45 393 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2c	45 393 50	Sitzkissen SLIMLINE 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2c	45 393 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 393 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2d	50 395 00	Sitzkissen schwarz 5cm kpl. SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 395 01	Sitzkissen-Verbundschaum 5cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2d	50 395 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2e	45 395 00	Sitzkissen 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2e	45 395 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2f	45 395 50	Sitzkissen SLIMLINE 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2f	45 395 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 395 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.

FIDIBUS – anatomisch geformte Sitzeinheit

FIDIBUS – F hinten gerade (bei Rollstühlen mit Rückenbespannung)

FIDIBUS (bei Rollstühlen mit FIDIBUS-Rücken)

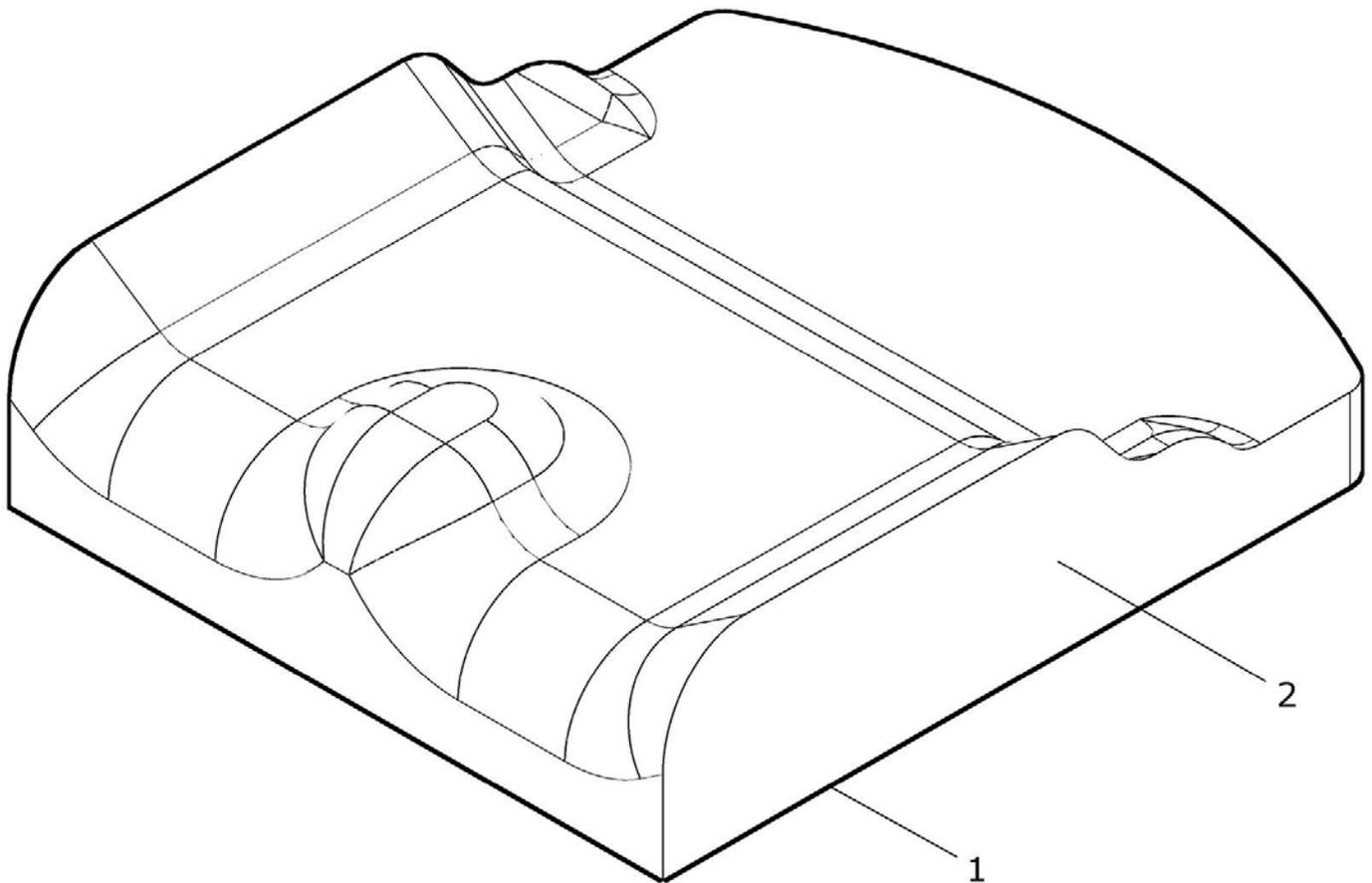

FIDIBUS-F – Sitzkissen bei Verwendung einer Rückenbespannung:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	25 355 00	Sitzkissen FIDIBUS-F kpl. anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F (hinten gerade) mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte (für Rollstühle mit Rückenbespannung) SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.
1	25 356 00	Sitzkissen FIDIBUS-F (ohne Bezug) anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F für Rollstühle mit Rückenbespannung (hinten gerade) mit eingearbeiteter Aluplatte SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 356 81	Sitzkissenbezug für anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.

FIDIBUS - Sitzkissen bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken oder MATRIX-Rücken:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	25 350 00	FIDIBUS Sitz - anatomisch geformter Sitz SB.. ST.. kpl. Sitzformteil mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte (bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken oder MATRIX-Rücken) SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.
1	25 351 00	Sitzkissen FIDIBUS (ohne Bezug) Anatomisch geformtes Sitzkissen FIDIBUS mit eingearbeiteter Aluplatte (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 251 81	Bezug für anatomisch geformten Sitz FIDIBUS SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.

Seitenteil

Gruppe 4

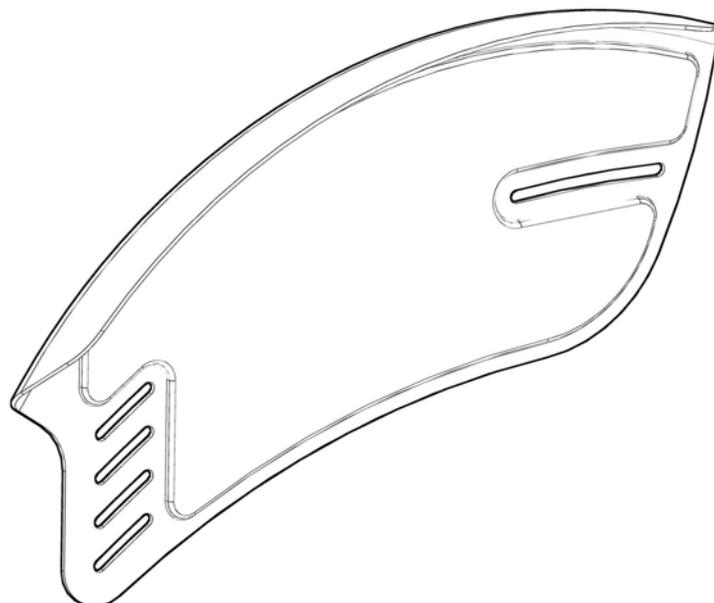


Kleiderschutz Aluminium anschraubbar

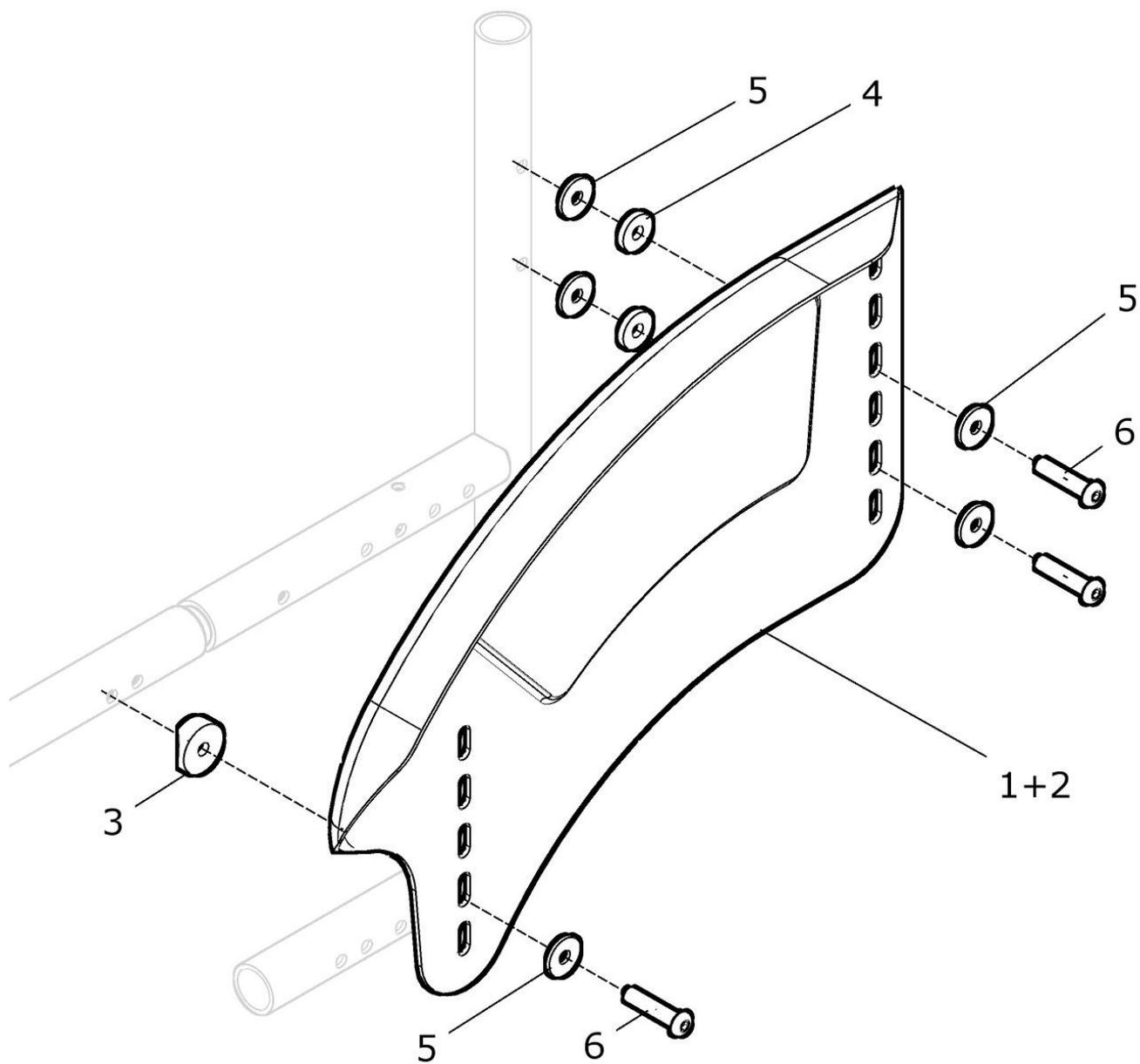


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	50 415 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium Paar kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 6	50 416 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1b - 6	50 417 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1a	50 416 01	Kleiderschutz 24" rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	50 417 01	Kleiderschutz 24" rund Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
1 - 6	22 425 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium Paar kpl. FM: ?	1 Paar
1c - 6	22 426 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1d - 6	22 427 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1c	22 426 01	Kleiderschutz 22" rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1d	22 427 01	Kleiderschutz 22" rund Aluminium links FM: ?	1 St.

Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz anschraubbar

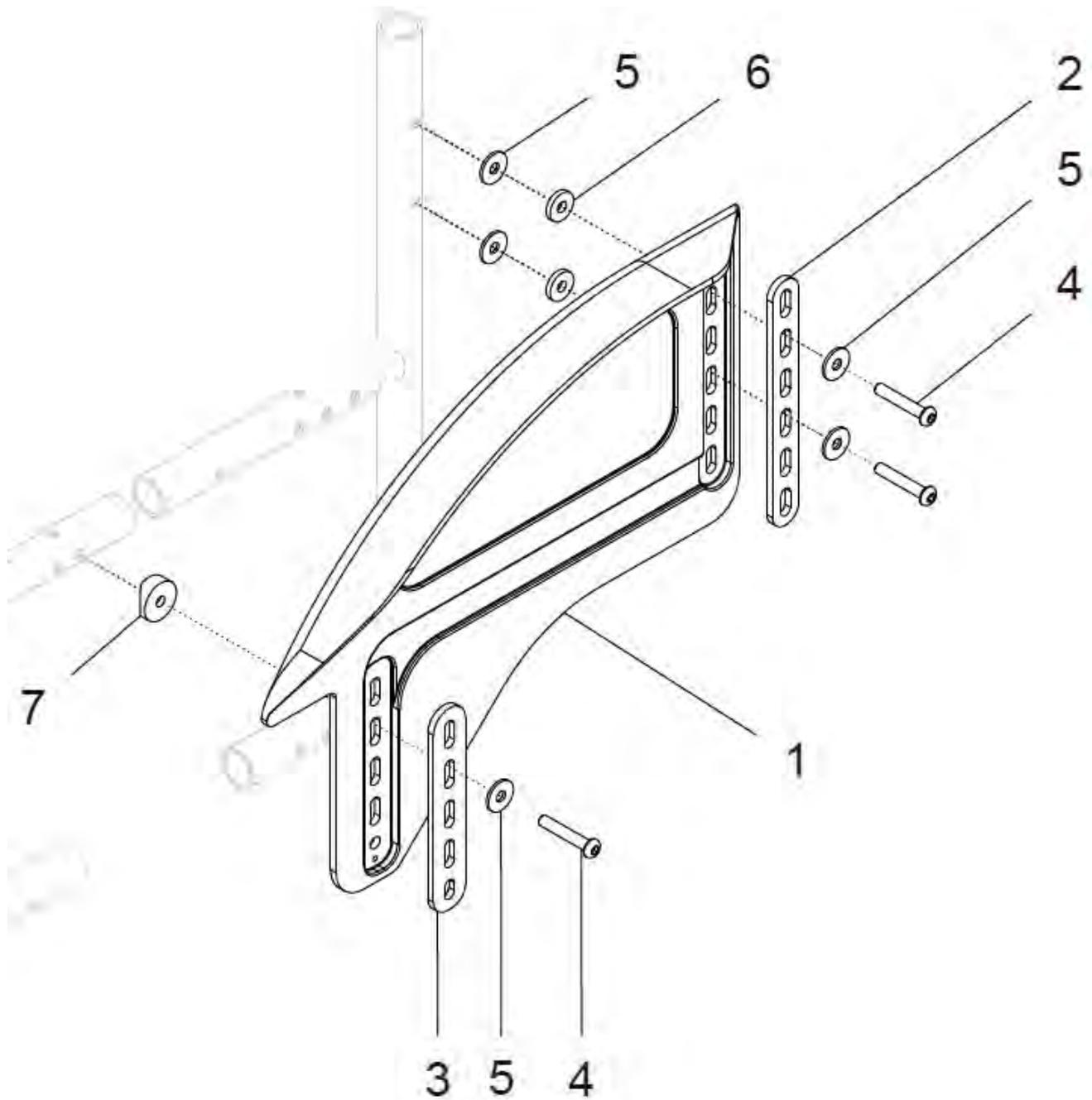

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	22 499 00	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz Paar kpl. mit Halterung / Verstärkung (für Junior 2 / Little)	1 Paar.
1a - 7	22 499 20	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz rechts kpl. mit Verstärkung	1 St.
1b - 7	22 499 30	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz links kpl. mit Verstärkung	1 St.
1a	25 449 21	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz rechts	1 St.
1b	25 449 31	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz links	1 St.
2 - 7	50 411 10	Verstärkung Kleiderschutz anschraubbar kpl.	2 Satz
2	50 411 11	Verstärkung Kleiderschutz Kunststoff lang	2 St.
3	50 411 12	Verstärkung Kleiderschutz Kunststoff kurz	2 St.
4	01 152 25	Linsenschraube M6x35 - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.

Kleiderschutz PC-CARBON anschraubbar

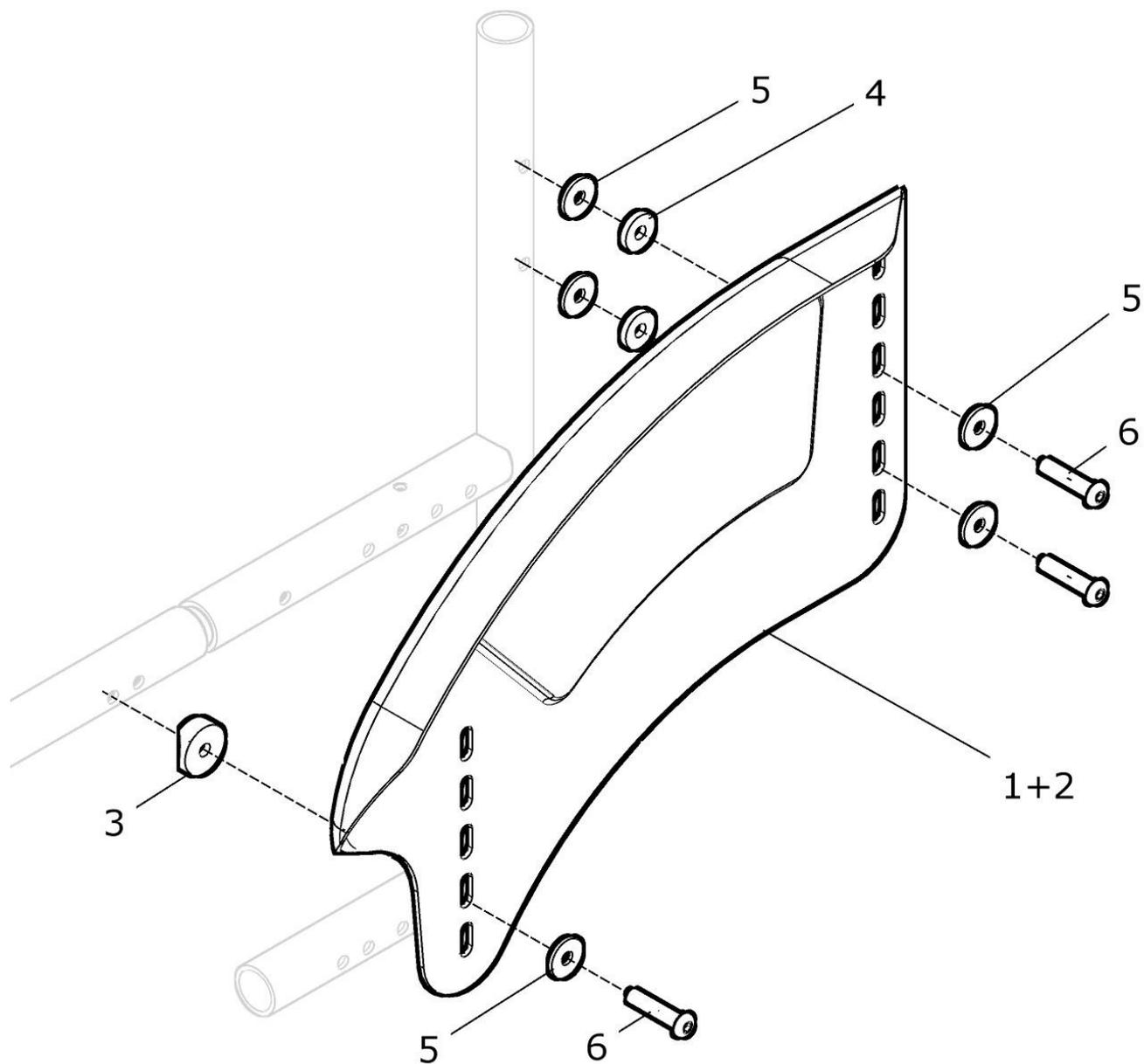

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b – 6	22 450 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1a – 6	22 452 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1b – 6	22 453 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1a	22 452 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1b	22 453 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 – 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


1c, 1d – 6	22 450 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1c – 6	22 452 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1d – 6	22 453 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1c	22 452 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1d	22 453 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links	1 St.

Kleiderschutz PC-CARBON b r e i t

1e, 1f – 6	22 450 20	Kleiderschutz 24“ rund b r e i t PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1e	22 452 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1f	22 453 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON links	1 St.


1g, 1h – 6	22 450 30	Kleiderschutz 22“ rund b r e i t PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1g	22 452 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1h	22 453 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON links	1 St.

Kleiderschutz rund Aluminium steckbar

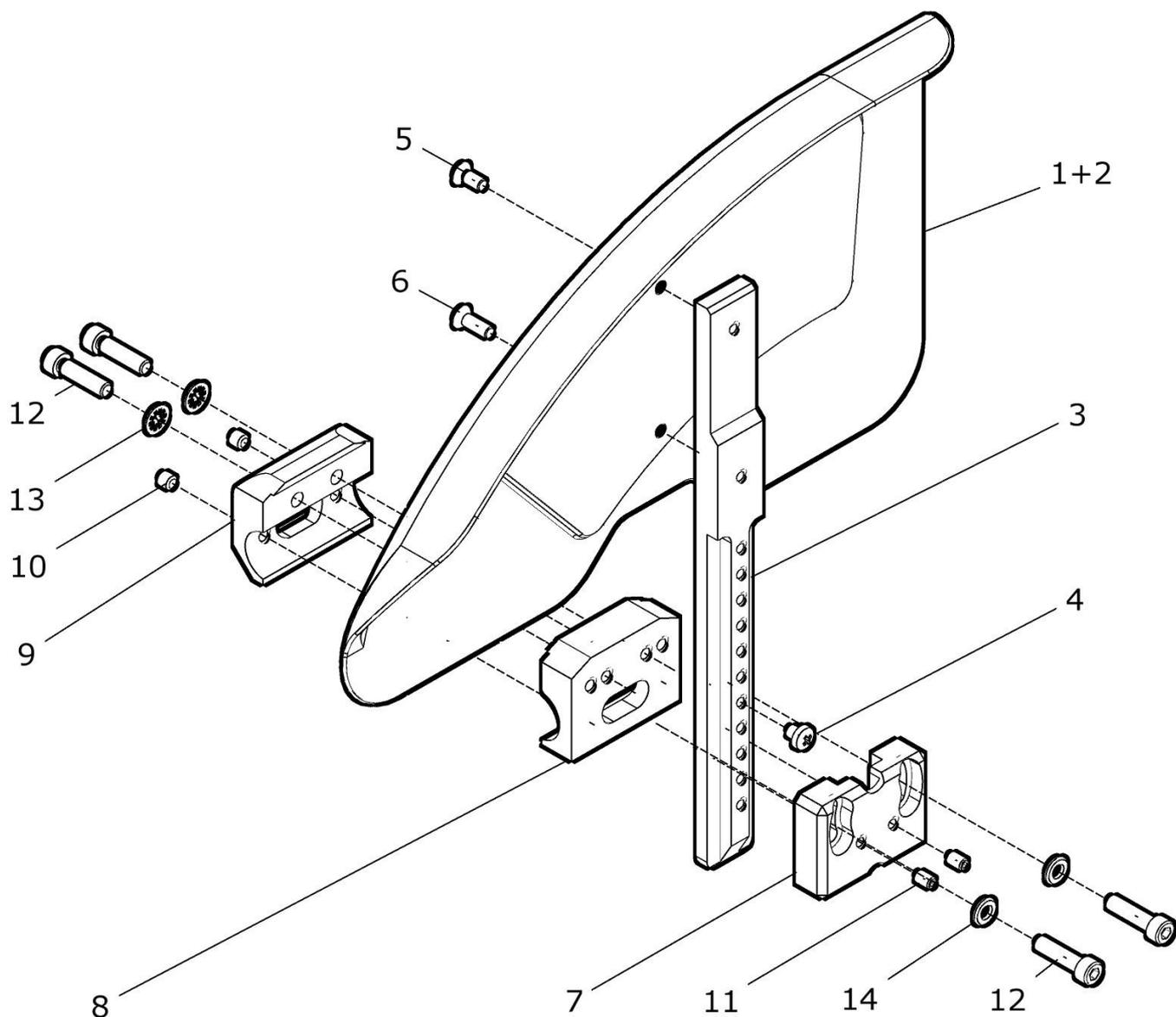


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	85 415 00	Kleiderschutz rund Aluminium steckbar Paar kpl. mit Schiene und Halterungen d=23 mm	1 Paar
1a – 14	85 416 00	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts kpl. mit Schiene und Halterung d=23 mm	1 St.
1b – 14	85 417 00	Kleiderschutz Aluminium steckbar links kpl. mit Schiene und Halterung d=23 mm	1 St.
1a – 6	85 416 10	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1b - 6	85 417 10	Kleiderschutz Aluminium steckbar links mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1a	85 416 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts	1 St.
1b	85 417 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
4	01 151 81	Linienkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
5	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
6	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 – 14	85 411 00	Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl. (links / rechts verwendbar)	2 St.
7	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
8	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
9	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
10	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
11	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
12	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungscheibe NM 6	4 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

Kleiderschutz Kunststoff steckbar

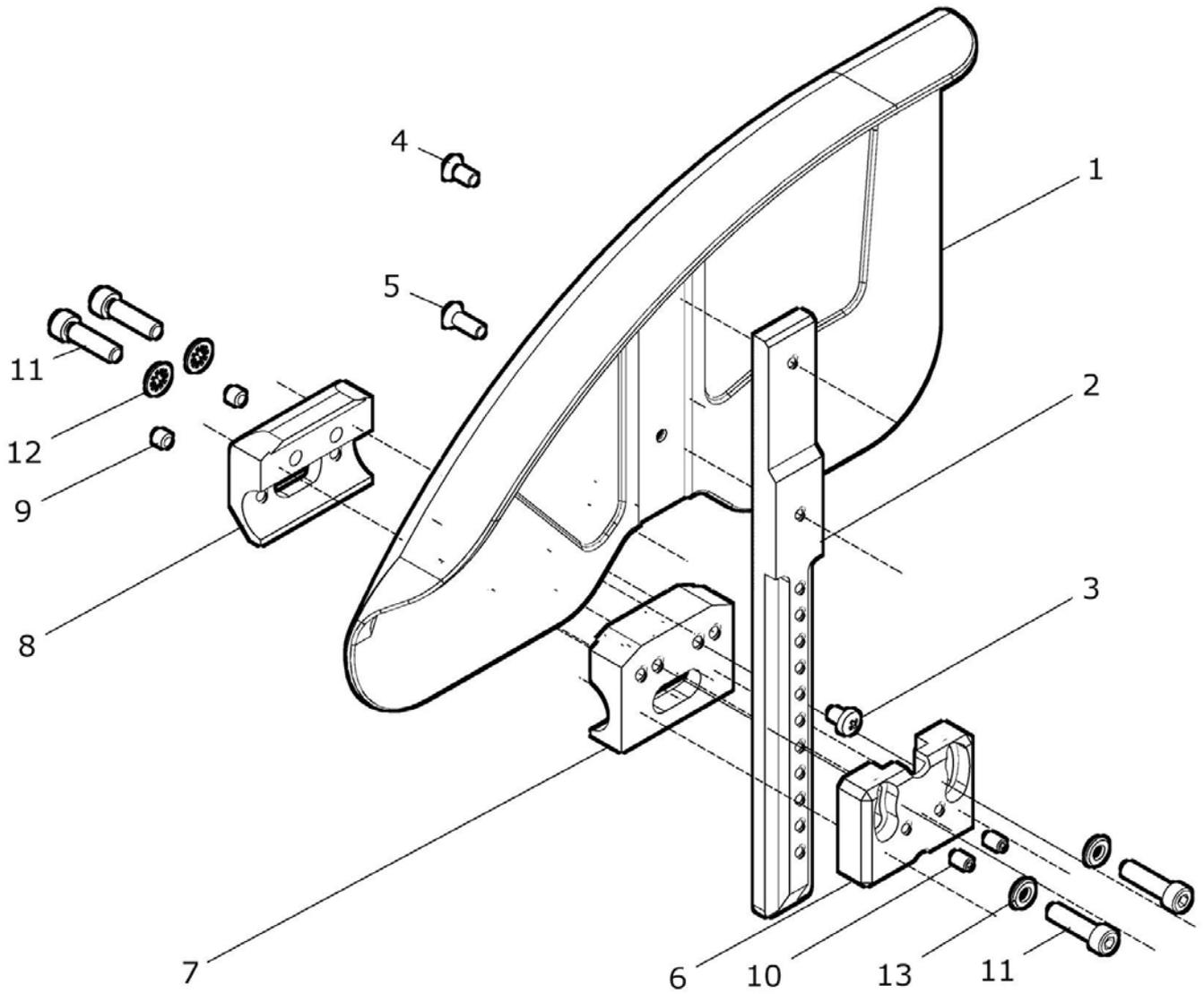

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	85 410 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar Paar kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 Paar
1a – 13	85 412 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 St.
1b – 13	85 413 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 St.
1a – 5	85 412 10	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1b – 5	85 413 10	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1a	85 412 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts	1 St.
1b	85 413 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links	1 St.
2	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
3	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
4	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
5	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
6 – 13	85 411 00	Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl. (links / rechts verwendbar)	2 St.
6	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
7	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
8	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
9	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
10	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
11	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.


Kleiderschutz rund Aluminium mit Armpolster

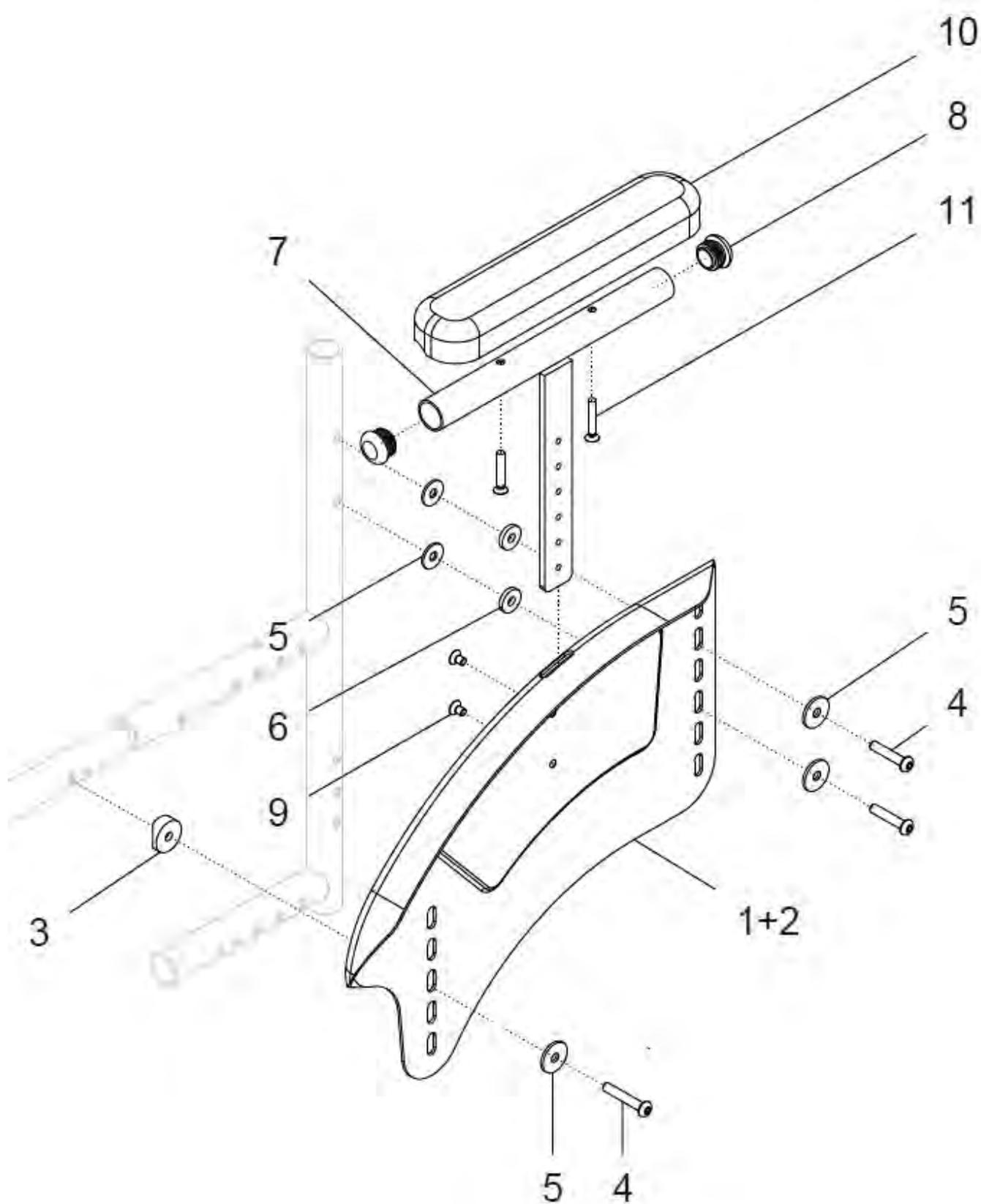

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 425 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1 - 11	22 425 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1a – 11	22 426 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b – 11	22 427 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1a – 11	22 426 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b - 11	22 427 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang links kpl. FM.: ?	1 St.
1a	50 416 51	Kleiderschutz 24“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	50 417 51	Kleiderschutz 24“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 425 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1 - 11	22 425 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1c – 11	22 426 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1d – 11	22 427 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1c – 11	22 426 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1d - 11	22 427 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang links kpl. FM.: ?	1 St.
1c	22 426 51	Kleiderschutz 22“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1d	22 427 51	Kleiderschutz 22“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungssteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.


Kleiderschutz rund PC-Carbon mit Armpolster

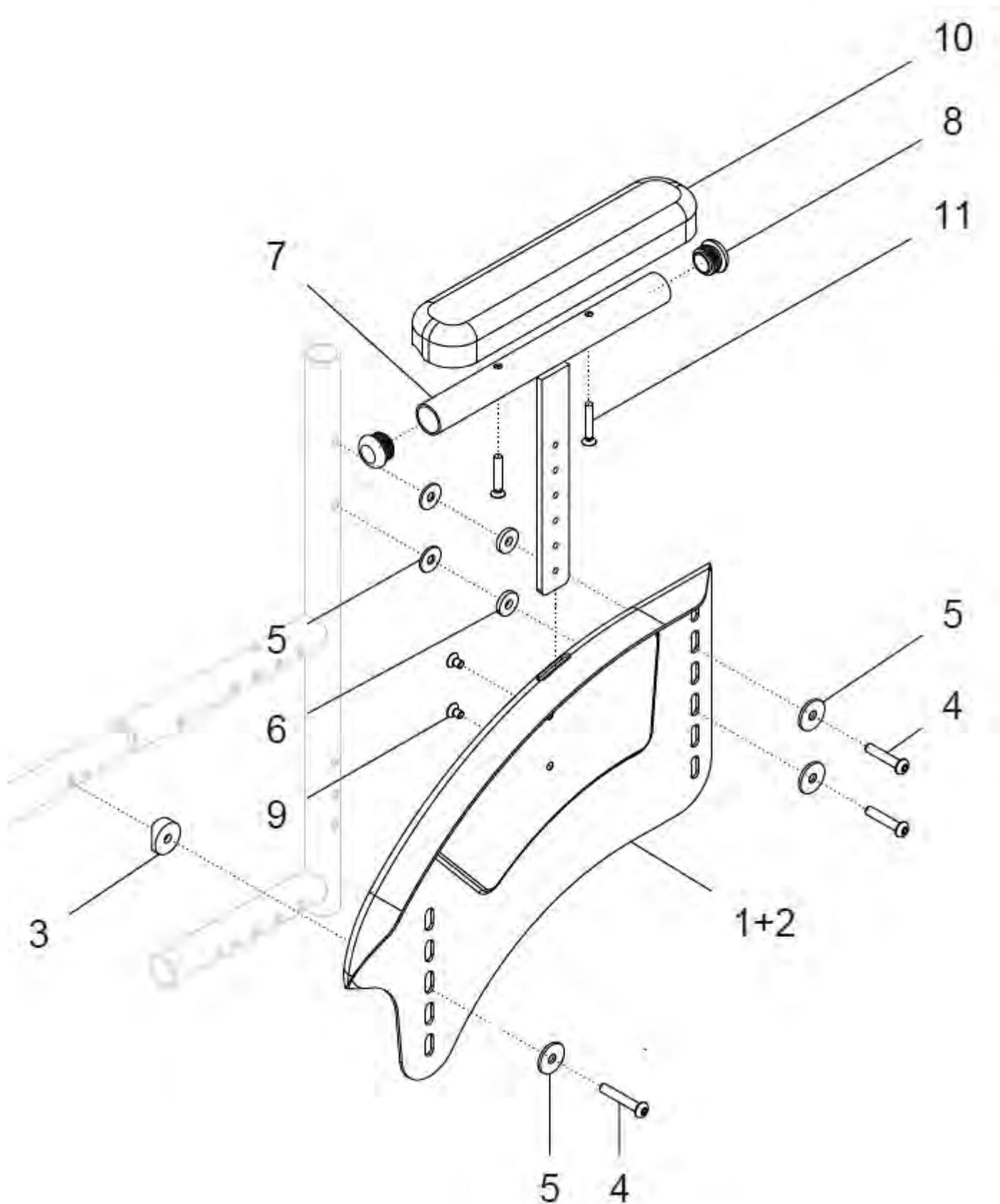

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 450 50	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster kurz Paar kpl.	1 Paar
1 - 11	22 450 70	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster lang Paar kpl.	1 Paar
1a – 11	22 452 50	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster kurz rechts kpl.	1 St.
1b – 11	22 453 50	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster kurz links kpl.	1 St.
1a – 11	22 452 70	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
1b - 11	22 453 70	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
1a	22 452 51	Kleiderschutz 24“ rechts PC-Carbon für Armpolster anschraubbar	1 St.
1b	22 453 51	Kleiderschutz 24“ links PC-Carbon für Armpolster anschraubbar	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 450 60	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster kurz Paar kpl.	1 Paar
1 - 11	22 450 80	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster lang Paar kpl.	1 Paar
1c – 11	22 452 60	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster kurz rechts kpl.	1 St.
1d – 11	22 453 60	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster kurz links kpl.	1 St.
1c – 11	22 452 80	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
1d - 11	22 453 80	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
1c	22 452 61	Kleiderschutz 22“ rechts PC-Carbon für Armpolster anschraubbar	1 St.
1d	22 453 61	Kleiderschutz 22“ links PC-Carbon für Armpolster anschraubbar	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungssteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.


Kleiderschutz rund PC-Carbon breit mit Armpolster

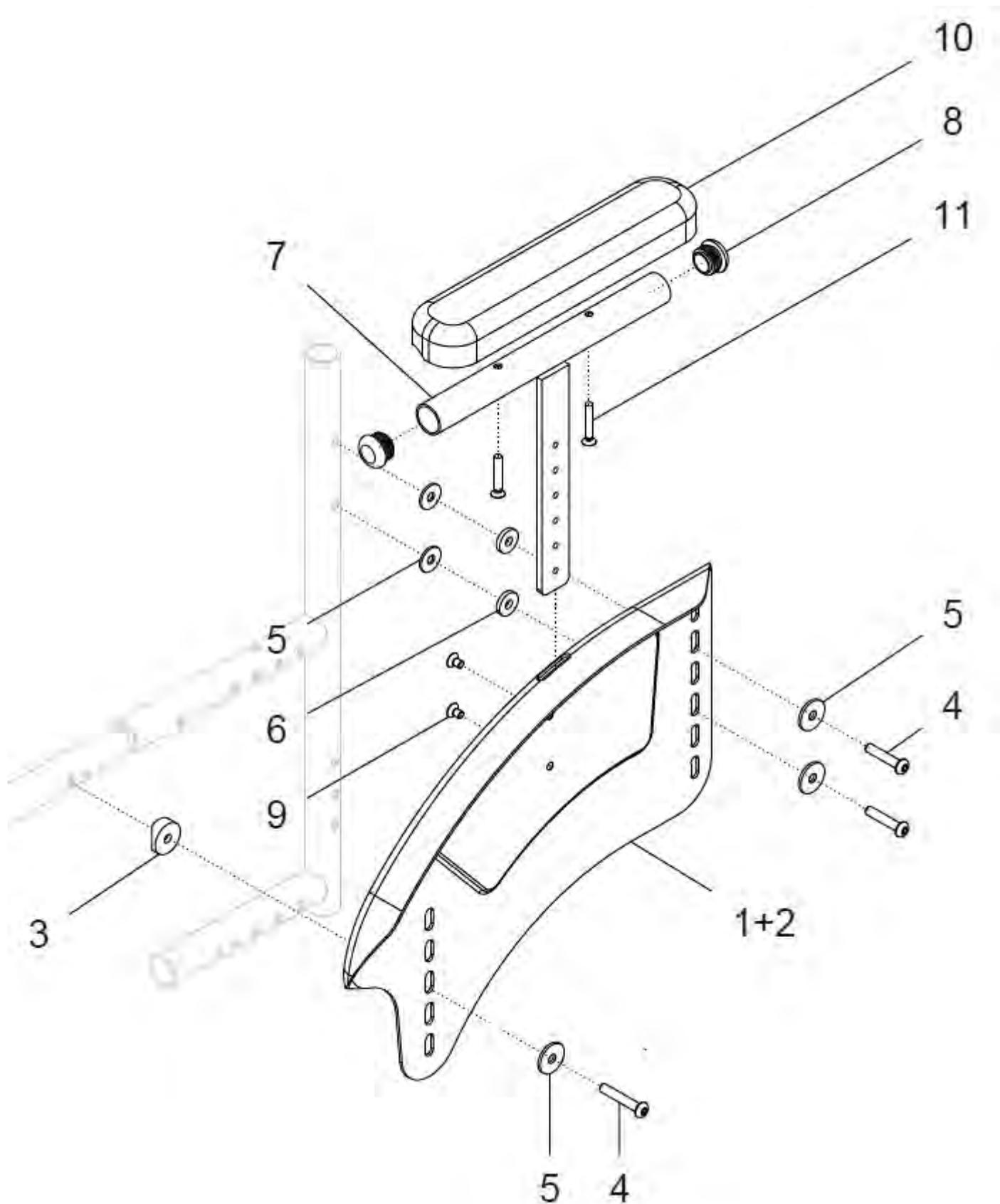

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 450 55	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armpolster kurz kpl.	1 Paar
1 - 11	22 450 75	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armpolster lang kpl.	1 Paar
1a – 11	22 452 55	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. kurz rechts kpl.	1 St.
1b – 11	22 453 55	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. kurz links kpl.	1 St.
1a – 11	22 452 75	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. lang rechts kpl.	1 St.
1b - 11	22 453 75	Kleiderschutz 24“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. lang links kpl.	1 St.
1a	22 452 56	Kleiderschutz 24“ rechts PC-Carbon <u>breit</u> für Armp. anschraubbar	1 St.
1b	22 453 56	Kleiderschutz 24“ links PC-Carbon <u>breit</u> für Armp. anschraubbar	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungssteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 450 65	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armpolster kurz kpl.	1 Paar
1 - 11	22 450 85	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armpolster lang kpl.	1 Paar
1c – 11	22 452 65	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. kurz rechts kpl.	1 St.
1d – 11	22 453 65	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. kurz links kpl.	1 St.
1c – 11	22 452 85	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. lang rechts kpl.	1 St.
1d - 11	22 453 85	Kleiderschutz 22“ PC-Carbon <u>breit</u> mit Armp. lang links kpl.	1 St.
1c	22 452 66	Kleiderschutz 22“ rechts PC-Carbon <u>breit</u> für Armp. anschraubbar	1 St.
1d	22 453 66	Kleiderschutz 22“ links PC-Carbon <u>breit</u> für Armp. anschraubbar	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Seitenteil Aluminium anschraubbar

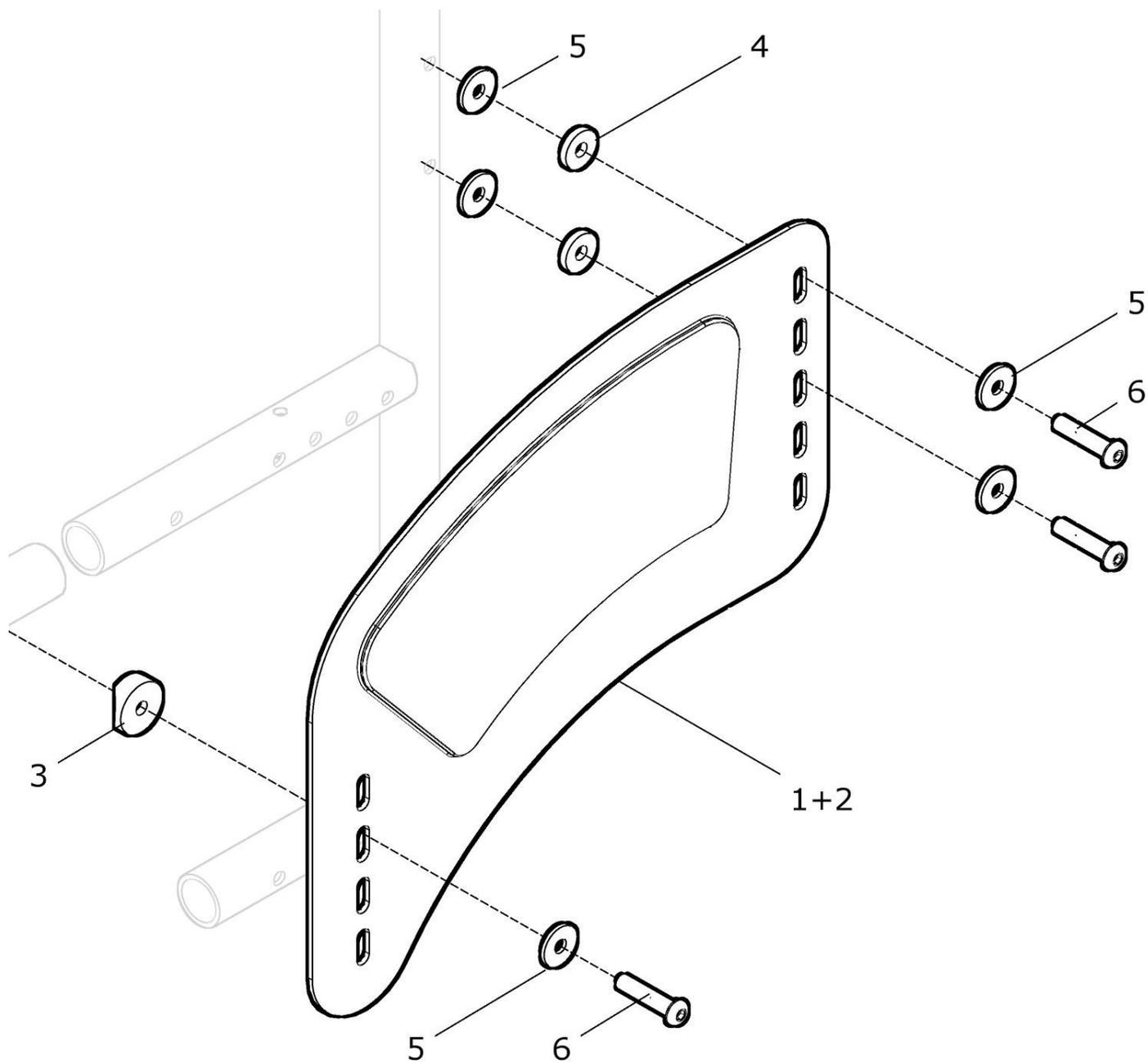

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	22 420 00	Seitenteil Aluminium anschraubbar Paar kpl. Seitenteilblech anschraubbar FM: ?	1 Paar
1a – 6	22 422 00	Seitenteil Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1b – 6	22 423 00	Seitenteil Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1a	22 422 01	Seitenteilblech Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	22 423 01	Seitenteilblech Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


Seitenteil Aluminium mit Armpolster kurz

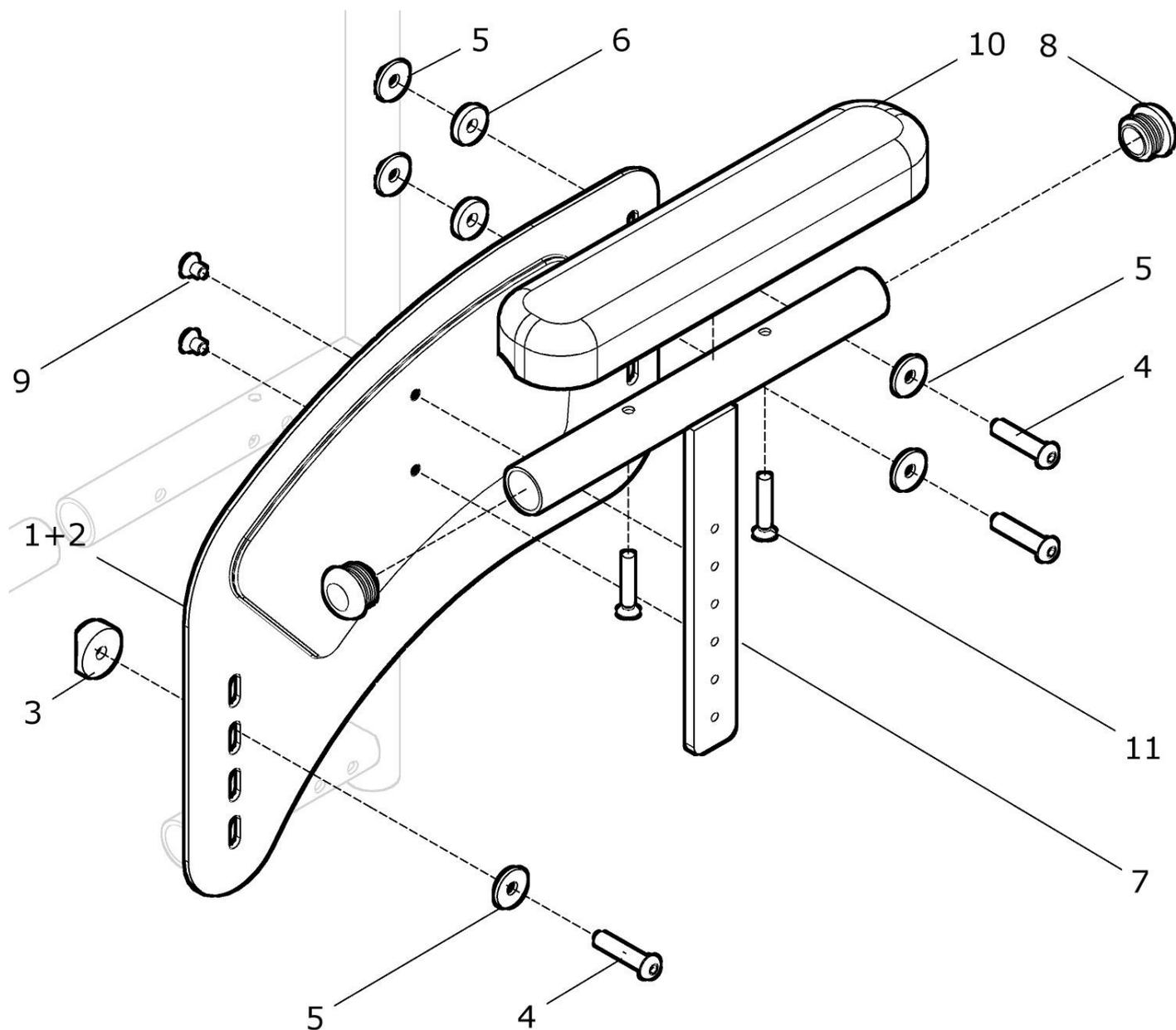

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 435 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1a – 11	22 436 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b – 11	22 437 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1a	22 436 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	22 437 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7 – 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Seitenteil Aluminium mit Armpolster höhenverstellbar

(Armpolsterhalter mit Schiene)

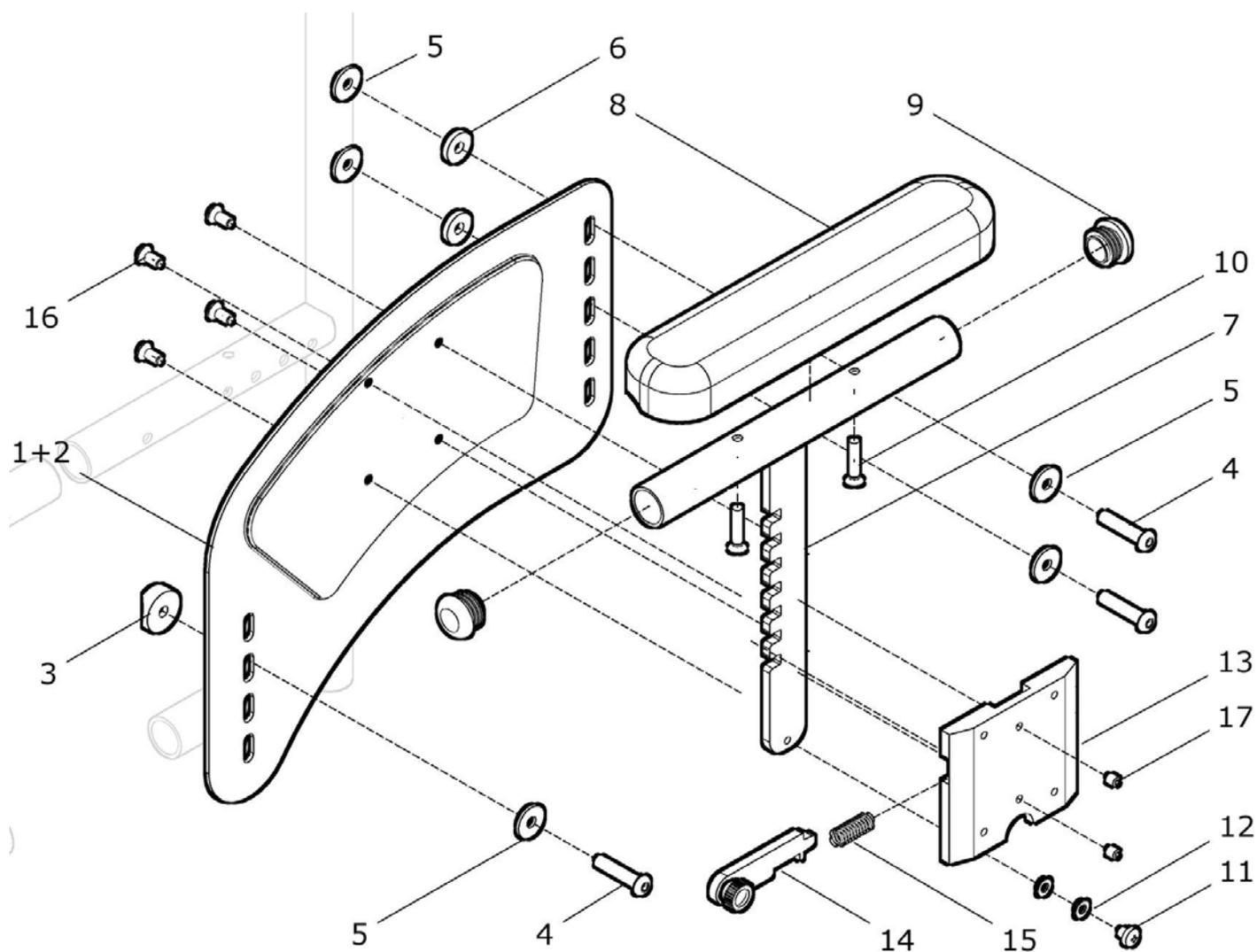


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 430 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 FM.: ?	1 Paar
1 – 17	22 430 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 FM.: ?	1 Paar
1a – 17	22 432 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 17	22 433 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 links FM.: ?	1 St.
1a – 17	22 432 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 17	22 433 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 links FM.: ?	1 St.
1a	22 432 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Schiene (50mm) FM: ?	1 St.
1b	22 433 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Schiene (50mm) FM: ?	1 St.
2a	22 432 02	Kälteschutz rechts für Seitenteil rechts mit Führungsgehäuse (50mm)	1 St.
2b	22 433 02	Kälteschutz links für Seitenteil links mit Führungsgehäuse (50mm)	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a, 8a – 12	90 442 30	Armpolsterhalter kurz rechts kpl. mit Armpolster kurz	1 St.
7b, 8a – 12	90 443 30	Armpolsterhalter kurz links kpl. mit Armpolster kurz	1 St.

7c, 8b – 12	90 442 60	Armpolsterhalter lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7d, 8b – 12	90 443 60	Armpolsterhalter lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7a	90 442 31	Armpolsterhalter kurz rechts (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7b	90 443 31	Armpolsterhalter kurz links (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7c	90 442 61	Armpolsterhalter lang rechts (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7d	90 443 61	Armpolsterhalter lang links (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
8a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
8b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
9	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
10	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
11	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
12	01 320 01	Scheibe 5,3 - DIN 125	4 St.
13 14a - 17	90 441 20	Führungsgehäuse flach mit Schieber rechts kpl.	2 St.
13, 14b - 17	90 441 30	Führungsgehäuse flach mit Schieber links kpl.	2 St.
13	90 441 01	Führungsgehäuse flach (50mm)	2 St.
14a	90 442 02	Schieber mit Mutter M5 rechts	1 St.
14b	90 443 02	Schieber mit Mutter M5 links	1 St.
15	02 110 05	Druckfeder Ø6,9x22mm für Schieber	2 St.
16	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
17	01 131 90	Gewindestift M5x6 (Poly) - DIN 551	4 St.

Seitenteil Aluminium mit Armpolster höhenverstellbar


(Armpolsterhalter mit Rohrprofil)

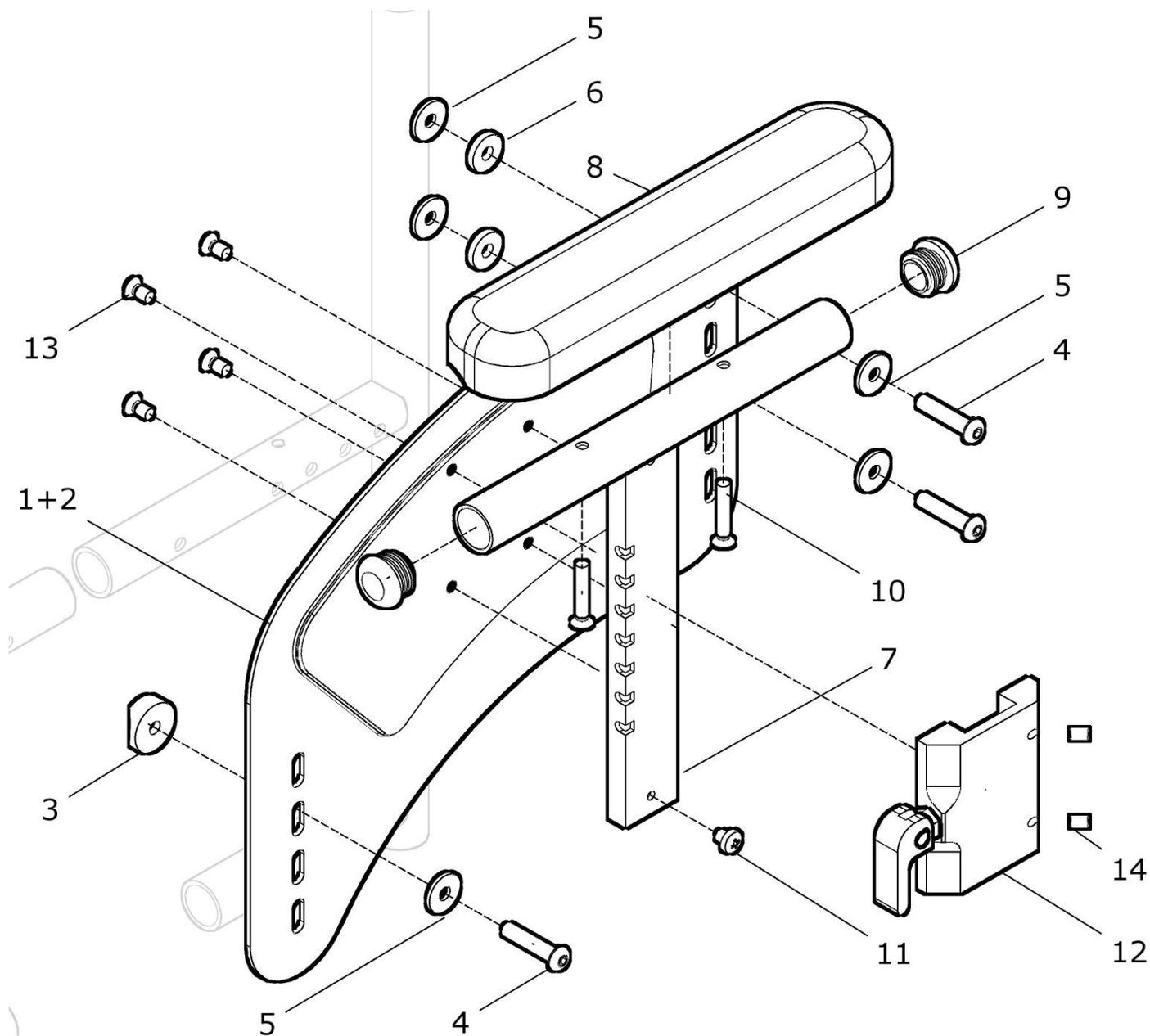

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	22 440 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 FM.: ?	1 Paar
1 – 14	22 440 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 FM.: ?	1 Paar
1a – 14	22 442 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 14	22 443 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 links FM.: ?	1 St.
1a – 14	22 442 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 14	22 443 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 links FM.: ?	1 St.
1a	22 442 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Rohrprofil (45mm) FM: ?	1 St.
1b	22 443 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Rohrprofil (45mm) FM: ?	1 St.
2a	22 442 02	Kälteschutz rechts für Seitenteil rechts mit Führungsgehäuse (45mm)	1 St.
2b	22 443 02	Kälteschutz links für Seitenteil links mit Führungsgehäuse (45mm)	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a, 8a – 11	50 432 30	Armpolsterhalter kurz rechts kpl. mit Armpolster kurz	1 St.
7b, 8a – 11	50 433 30	Armpolsterhalter kurz links kpl. mit Armpolster kurz	1 St.


7c, 8b – 11	50 432 50	Armpolsterhalter lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7d, 8b – 11	50 433 50	Armpolsterhalter lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7a	50 432 31	Armpolsterhalter kurz rechts (mit Rohr 30x10)	1 St.
7b	50 433 31	Armpolsterhalter kurz links (mit Rohr 30x10)	1 St.
7c	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts (mit Rohr 30x10)	1 St.
7d	50 433 51	Armpolsterhalter lang links (mit Rohr 30x10)	1 St.
8a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
8b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
9	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
10	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
11	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
12	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl.	2 St.
13	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
14	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.

Armlehne wegschwenkbar

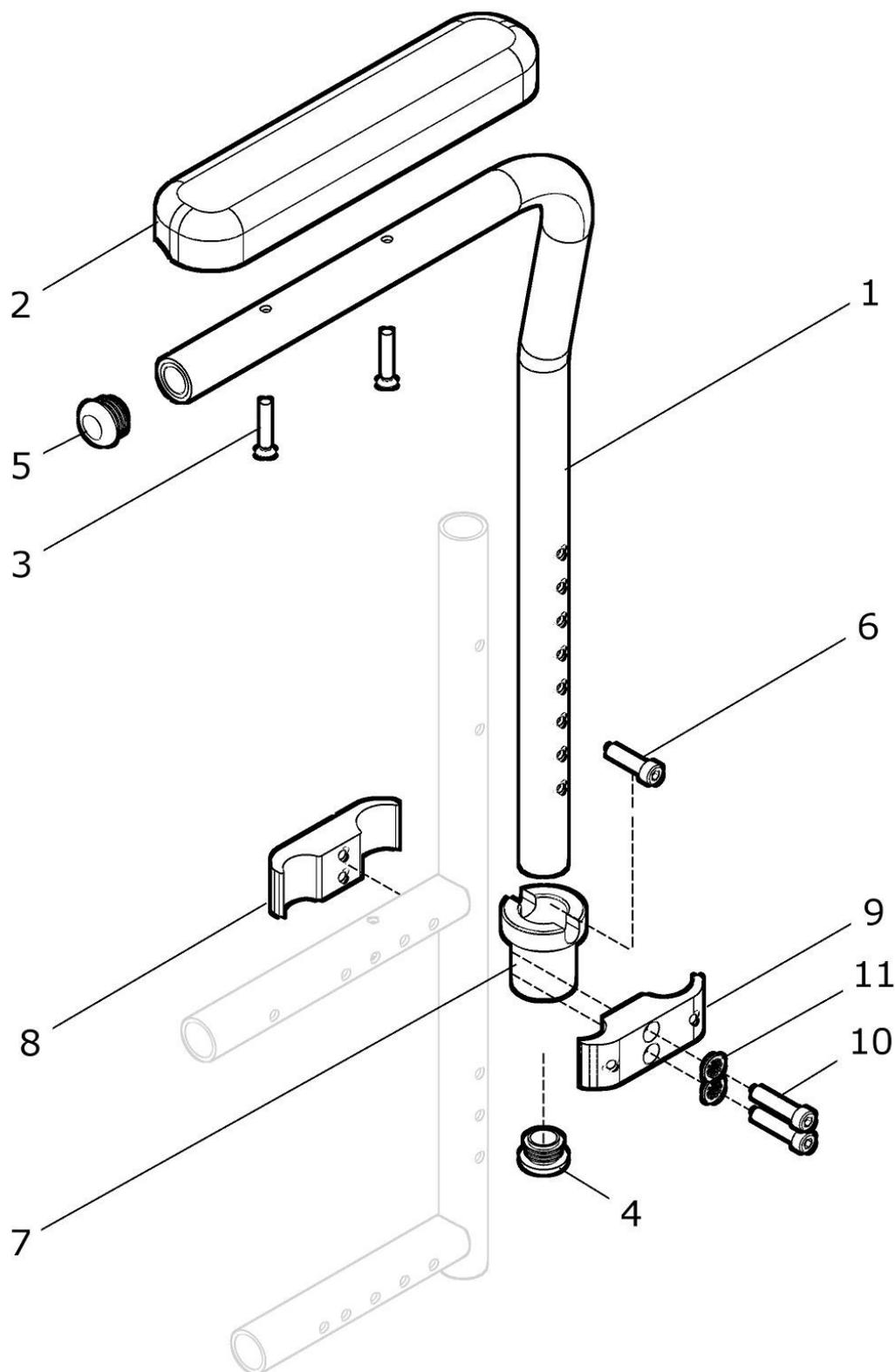

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 423 70	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 Paar
1 – 11	40 423 50	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 Paar
1a – 11	40 423 80	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz rechts kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1b – 11	40 423 85	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz links kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1c – 11	40 423 60	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang rechts kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1d – 11	40 423 65	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang links kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1a – 6	40 423 81	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz rechts kpl.	1 St.
1b – 6	40 423 86	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz links kpl.	1 St.
1c – 6	40 423 61	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
1d – 6	40 423 66	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
1a	40 423 82	Armlehnenhalterrohr kurz rechts	1 St.
1b	40 423 83	Armlehnenhalterrohr kurz links	1 St.
1c	40 423 62	Armlehnenhalterrohr lang rechts	1 St.
1d	40 423 63	Armlehnenhalterrohr lang links	1 St.
2a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
2b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
3	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
4a	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23	2 St.
5a	04 210 01	Verschlusstopfen Ø19 (bei Armpolster kurz)	2 St.
5b	04 210 02	Verschlusstopfen Ø23 (bei Armpolster lang)	2 St.
6	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
7 – 11	40 423 59	Aufnahmebuchse mit Armlehnenhalter kpl.	2 St
7	40 423 51	Aufnahmebuchse	2 St.
8 – 11	40 423 55	Armlehnenhalter kpl.	2 St
8	40 423 52	Armlehnenhalter M6	2 St.
9	40 423 53	Armlehnenhalter Ø6,5/Ø11	2 St.
10	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.


Seitenteil Kunststoff kurz mit Armpolster steckbar

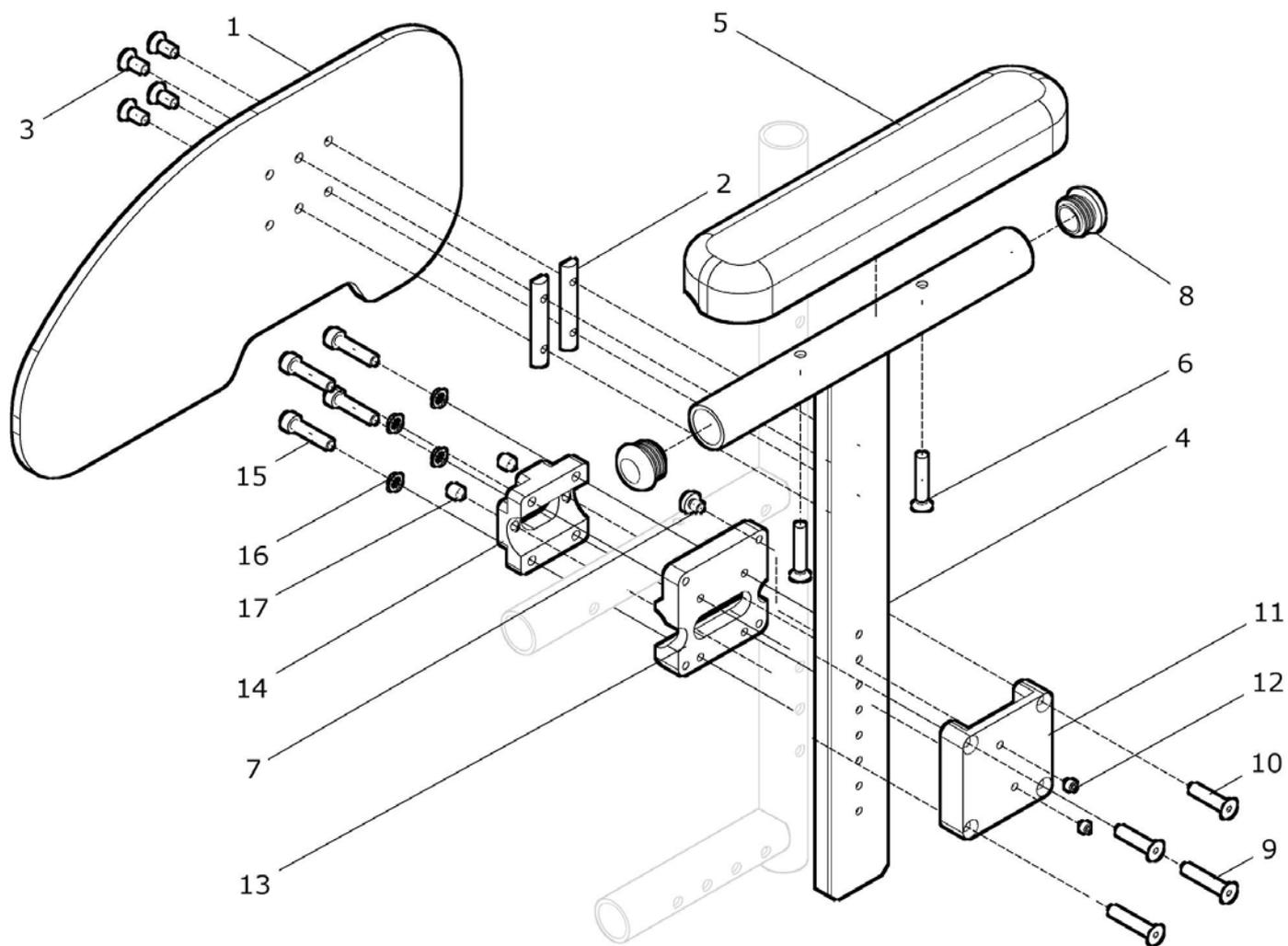

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 480 00	Seitenteil Kunststoff kurz steckbar mit Armposter kurz kpl. Armpolsterhalter kurz mit Klemmhalterung	1 Paar
1 – 17	22 480 50	Seitenteil Kunststoff kurz steckbar mit Armposter lang kpl. Armpolsterhalter lang mit Klemmhalterung	1 Paar
1a – 4a, 5a – 17	22 482 00	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz rechts kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1b – 4a, 5a – 17	22 483 00	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz links kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1a – 4b, 5b – 17	22 482 50	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang rechts kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1b – 4c, 5b – 17	22 483 50	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang links kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1a – 4a, 5a – 8	22 482 10	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz rechts (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1b – 4a, 5a – 8	22 483 10	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz links (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1a – 4b, 5b – 8	22 482 60	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang rechts (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1b – 4c, 5b – 8	22 483 60	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang links (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1a	22 482 11	Seitenteilplatte Kunststoff kurz rechts	1 St.
1b	22 483 11	Seitenteilplatte Kunststoff kurz links	1 St.
2	91 411 01	Nutenstein für Seitenteilplatte	4 St.
3	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
4a, 5a – 8	91 411 10	Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links kpl. mit Armpolster kurz	2 St.
4b, 5b – 8	91 416 25	Armpolsterhalter steckbar lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
4c, 5b – 8	91 417 25	Armpolsterhalter steckbar lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
4a	91 411 11	Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links	2 St.
4b	91 416 21	Armpolsterhalter steckbar lang rechts	1 St.
4c	91 417 21	Armpolsterhalter steckbar lang links	1 St.
5a	04 100 01	Armpolster 235 kurz	2 St.
5b	04 100 02	Armpolster 368 lang	2 St.

6	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
7	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
8	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
9 - 17	50 481 00	Klemmhalterung für Seitenteil steckbar kpl. Halierungssatz 3-teilig	2 St.
9	01 120 06	Senkschraube M5x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 120 05	Senkschraube M5x25 - DIN 7991	4 St.
11	91 411 12	Klemmschelle Profil Seitenteil steckbar (Kunststoff schwarz)	2 St.
12	01 131 90	Gewindestift M5x6 Poly - DIN 551	4 St.
13	50 481 01	Aufnahmeplatte geklemmt Seitenteil steckbar	2 St.
14	50 481 02	Klemmschelle innen Seitenteil steckbar	2 St.
15	01 160 10	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	8 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	8 St.
17	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.

Therapietisch

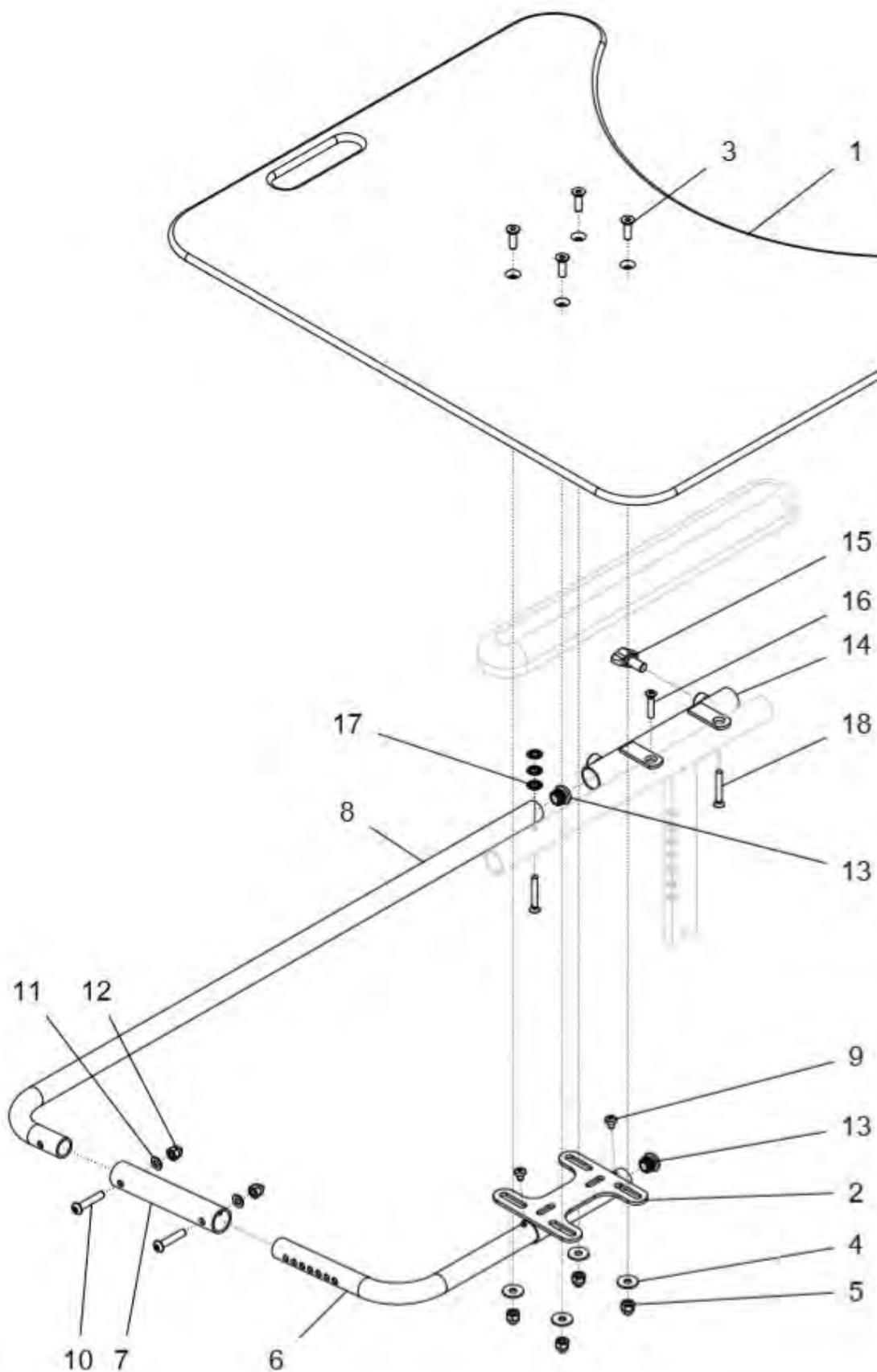


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	50 460 00	Therapietisch mit Halterung kpl Therapietischplatte mit Bügelrohr, Auflagerplatte und Führungsrohr SB: ?	1 St.
1a	50 461 12	Therapietischplatte (T500xB600) SB 42 - 50	1 St.
1b	50 461 13	Therapietischplatte (T450xB500) SB 34 – 40	1 St.
1c	50 461 16	Therapietischplatte (T400xB400) SB 24 – 32	1 St.
2 - 5	50 461 10	Auflagerplatte Therapietisch kpl.	1 St.
2	50 461 01	Auflagerplatte Therapietisch	1 St.
3	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
4	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
6a, 7a, 8a – 13	50 461 03	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 38 - 50	1 St.
6b, 7b, 8b - 13	22 461 20	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 28 - 36	1 St.
6c, 7c, 8b - 13	22 461 10	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 24 - 30	1 St.
6a	50 461 33	Verstellrohr lang SB 38 – 50	1 St.
6b	50 461 43	Verstellrohr mittel SB 28 – 36	1 St.
6c	22 461 23	Verstellrohr kurz SB 24 – 30	1 St.
7a	50 461 32	Verbindungsrohr SB 38 – 50	1 St.
7b	22 461 22	Verbindungsrohr SB 28 – 36 mittel	1 St.
7c	22 461 12	Verbindungsrohr SB 24 – 30 kurz	1 St.
8a	50 461 31	Schieberohr SB 38 – 50	1 St.
8b	22 461 21	Schieberohr SB 24 – 36 kurz	1 St.
9	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
10	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4	2 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
13	04 210 01	Verschluß-Stopfen d=19 mm	2 St.
14 - 18	50 461 20	Führungsrohr kpl.	1 St.
14a	50 461 02	Führungsrohr (Mutter seitlich) standard	1 St.
14b	50 461 09	Führungsrohr (Mutter nach unten) Sonderbau	1 St.
15	01 191 08	Flügelschraube mini wing M8x12	1 St.

JUNIOR2 AR / SLT

16	01 121 01	Linsensenkschraube M5x25 - DIN 966	1 St.
17	01 320 01	Scheibe 5,3 - DIN 125	3 St.
18	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - DIN 966	2 St.

Kleiderschutz ERGO AL

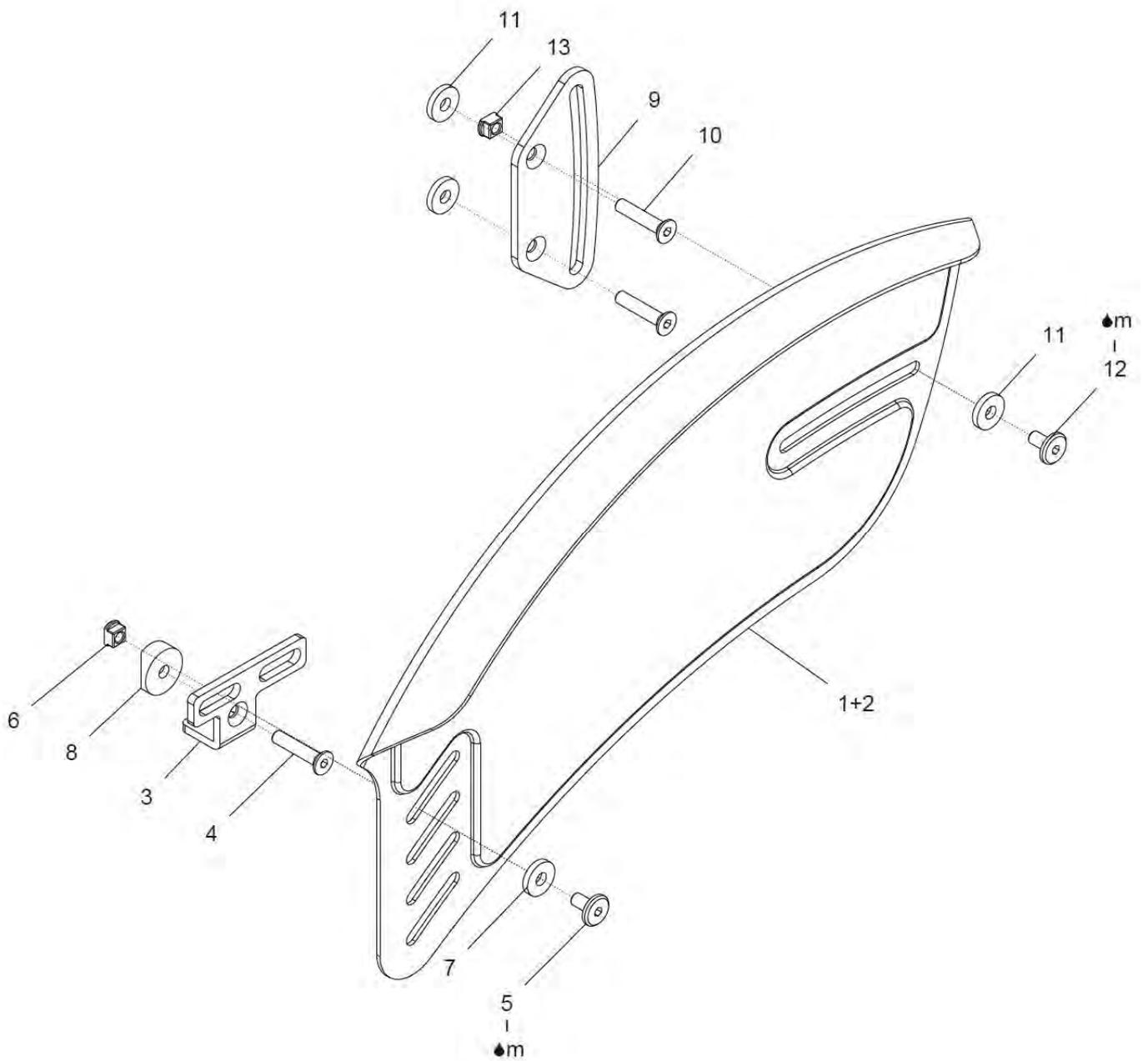

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 13	40 430 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1a – 13	40 432 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1b – 13	40 432 03	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 13	40 430 04	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1c – 13	40 434 02	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1d – 13	40 434 03	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL bei 30°-Rücken / Zahnsegmente

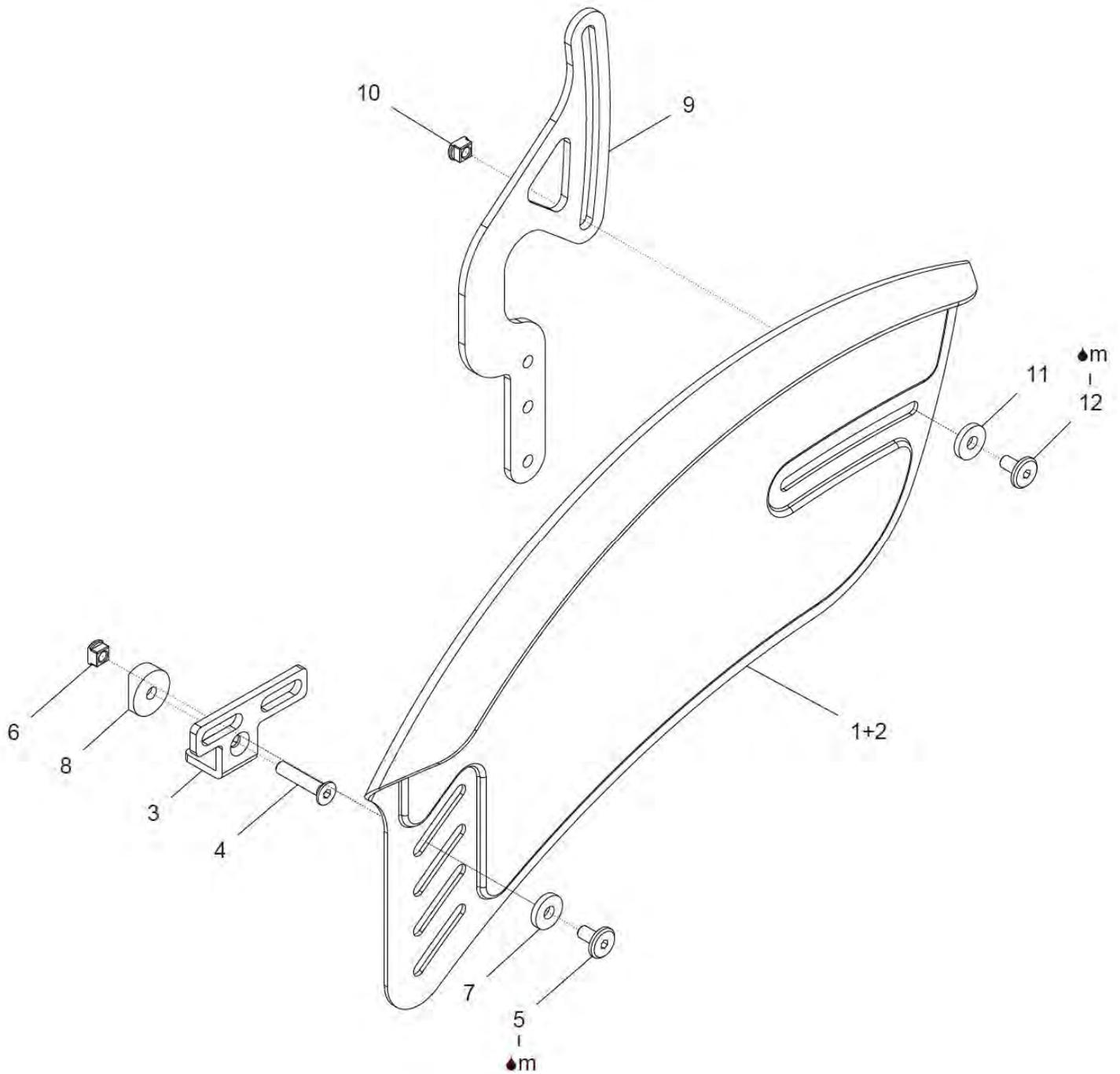

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	40 430 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1a – 12	40 432 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1b – 12	40 432 43	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	40 430 44	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1c – 12	40 434 42	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1d – 12	40 434 43	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL bei UNITOMIC-Rücken

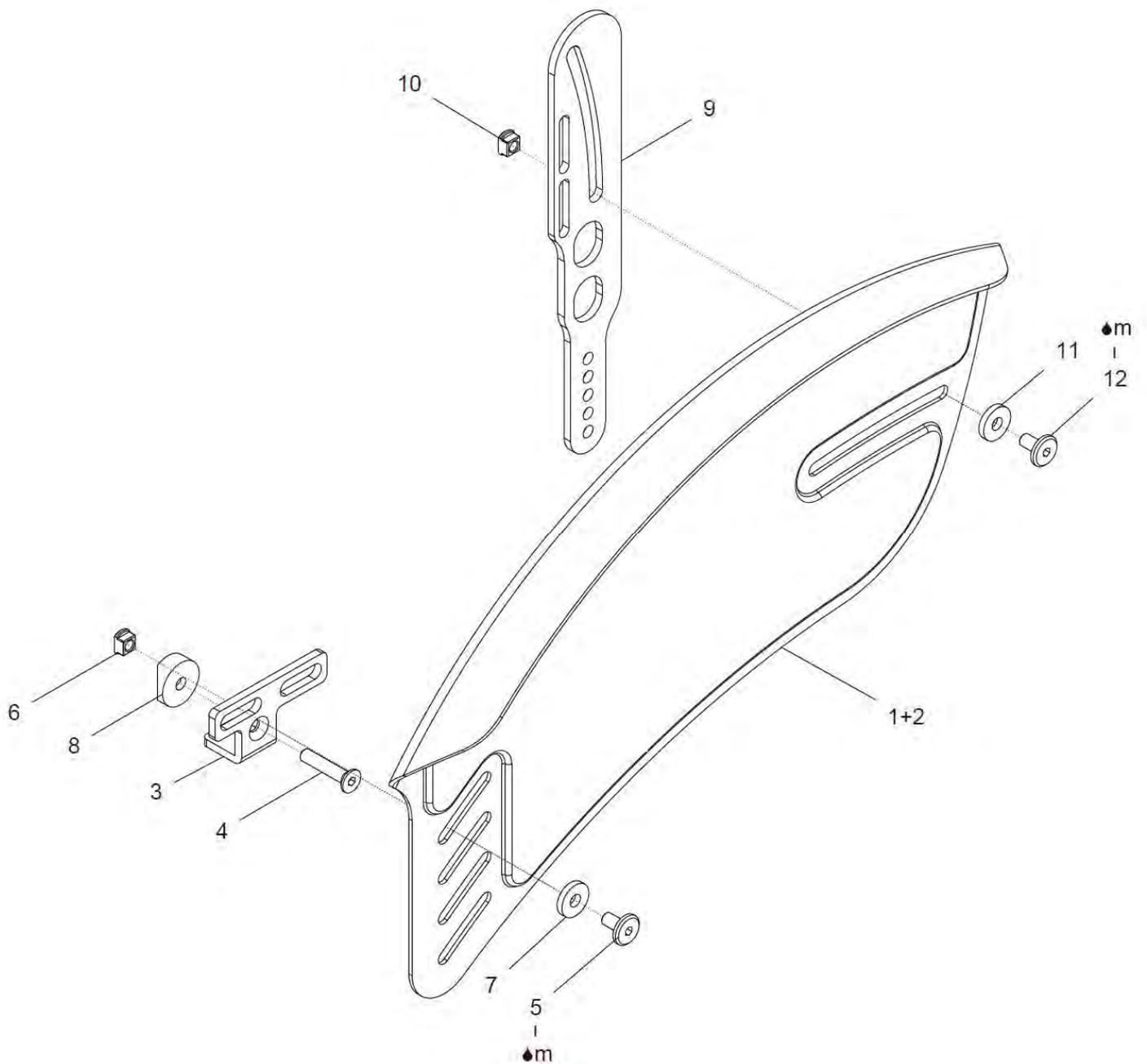

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	40 430 45	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1a – 12	40 432 44	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1b – 12	40 432 45	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	40 430 46	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1c – 12	40 434 44	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1d – 12	40 434 45	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO CARBON

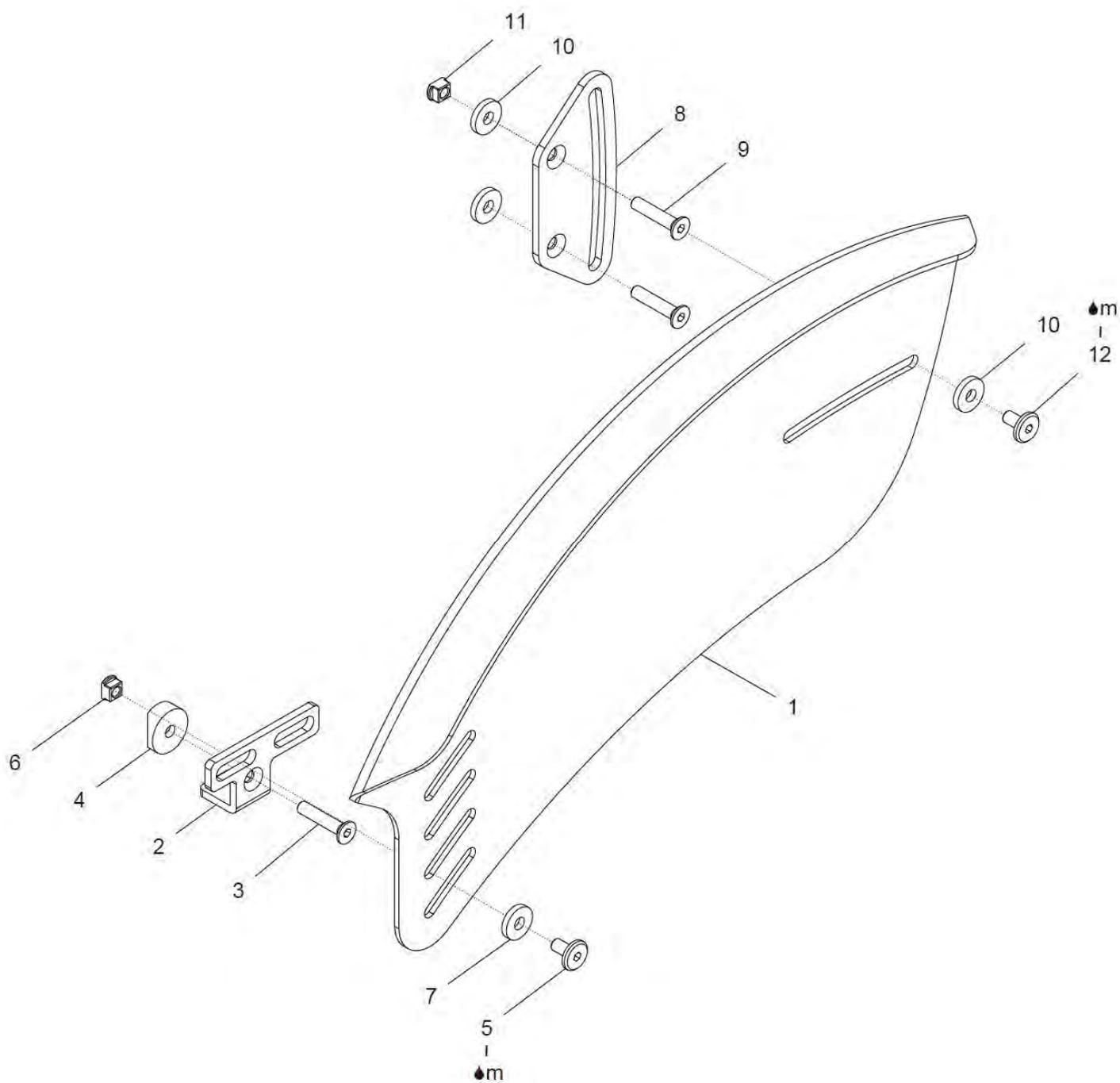

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 12	40 430 72	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 Paar
1a – 12	40 432 60	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1b – 12	40 432 70	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1a	40 432 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts	1 St.
1b	40 432 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links	1 St.
2a – 7	40 431 20	Halterung ERGO vorne rechts kpl.	1 Satz
2b – 7	40 431 30	Halterung ERGO vorne links kpl.	1 Satz
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 12	40 431 10	Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.	2 Satz
8	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
9	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 12	40 430 74	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 Paar
1c – 12	40 434 60	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1d – 12	40 434 70	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1c	40 434 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts	1 St.
1d	40 434 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links	1 St.
2a – 7	40 431 20	Halterung ERGO vorne rechts kpl.	1 Satz
2b – 7	40 431 30	Halterung ERGO vorne links kpl.	1 Satz
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 12	40 431 10	Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.	2 Satz
8	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
9	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz

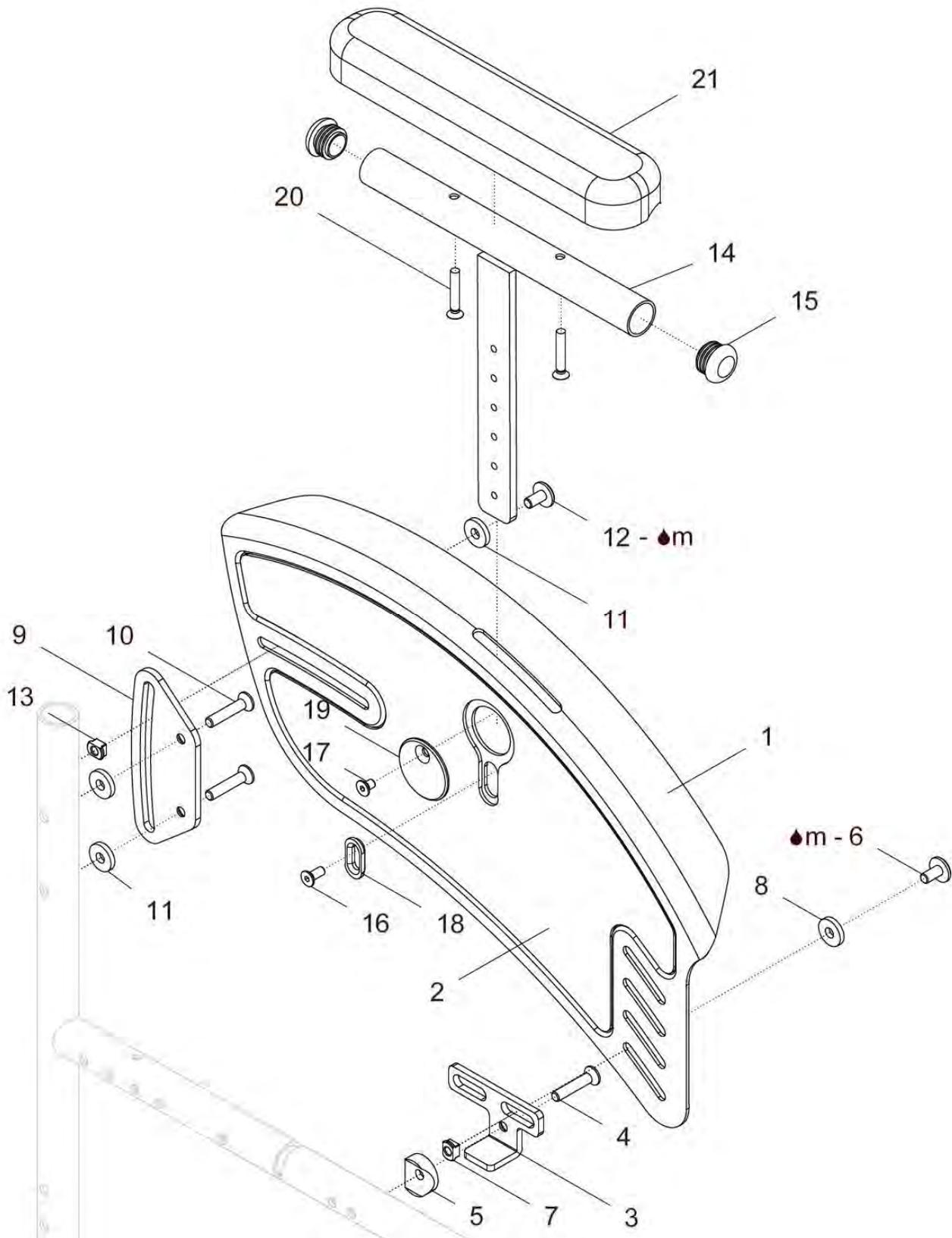

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	40 442 00	Kleiderschutz Ergo Al 22“ mit Armpolster kurz Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1a – 21	40 442 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1b – 21	40 442 03	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (für Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	40 444 00	Kleiderschutz Ergo Al 24“ mit Armpolster kurz Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1c – 21	40 444 02	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1d – 21	40 444 03	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz bei 30°-Rücken / Zahnsegmente

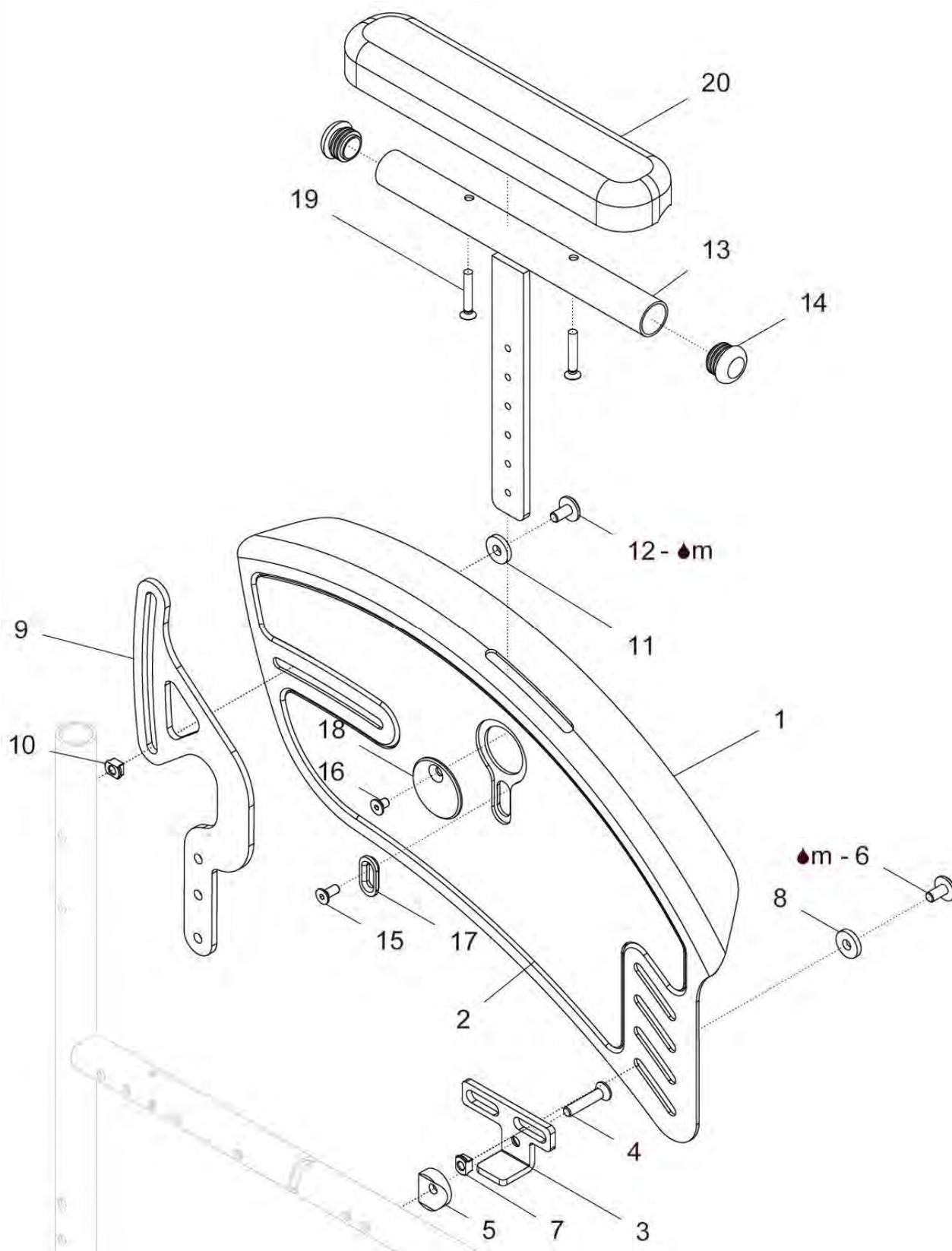

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 442 10	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1a – 20	40 442 12	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1b – 20	40 442 13	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 444 10	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1c – 20	40 444 12	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1d – 20	40 444 13	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz bei UNITOMIC-Rücken

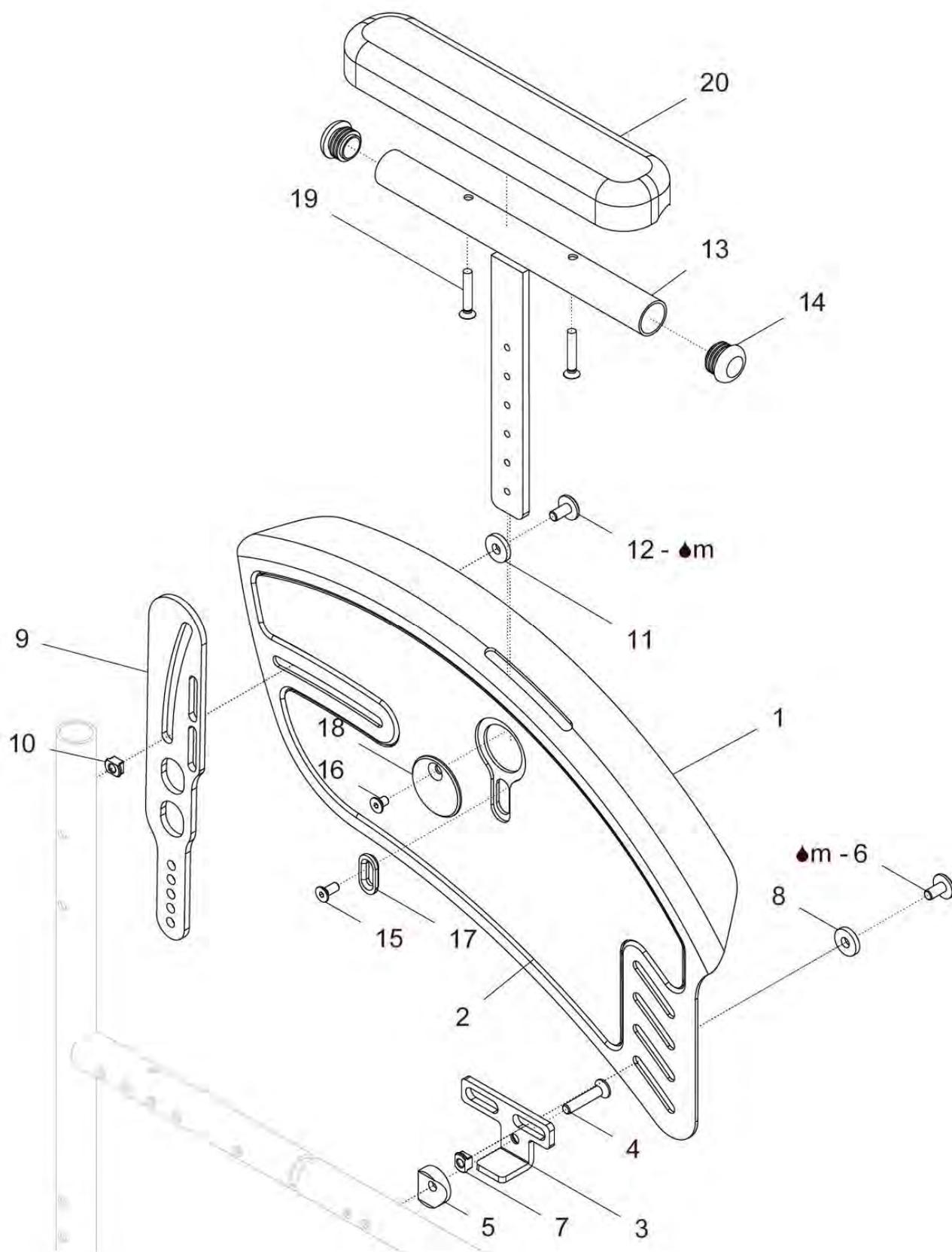

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 442 40	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1a – 20	40 442 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITMOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1b – 20	40 442 43	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 444 40	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1c – 20	40 444 42	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1d – 20	40 444 43	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Therapeutisch geklemmt am Rahmen

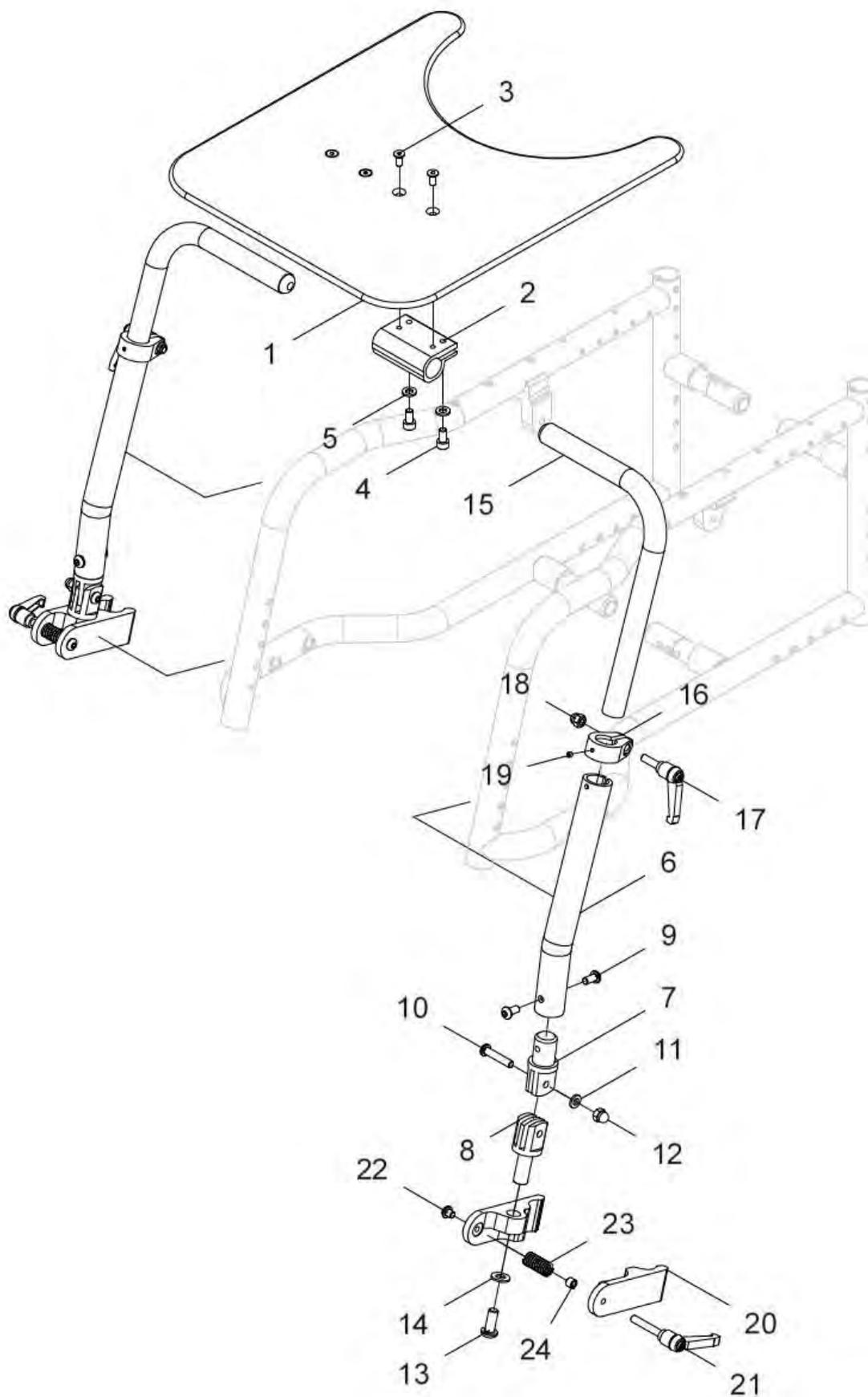


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	20 461 00	Therapietisch mit Halterung am Rahmen geklemmt kpl Therapietischplatte PC mit Halterung / Gestänge und mit Klemmhalter für Rahmen Ø23mm SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1 - 5	20 461 40	Therapietischplatte mit Tischaufnahme kpl. Therapietischplatte PC mit Tischaufnahme (ohne Halterung / Gestänge) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1a	20 461 81	Therapietischplatte 250 LB 0 B250xT300 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 20cm	1 St.
1b	20 461 82	Therapietischplatte 250 LB 20 B250xT300 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen Abduktion SB 20cm	1 St.
1c	20 461 83	Therapietischplatte 300 LB 0 B300xT350 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 22cm	1 St.
1d	20 461 84	Therapietischplatte 300 LB 20 B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 24 – 26cm	1 St.
1e	20 461 85	Therapietischplatte 300 LB 60 B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen Abduktion SB 22 – 26cm	1 St.
1f	20 461 86	Therapietischplatte 350 LB 50 B350xT380 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 28cm	1 St.
1g	20 461 87	Therapietischplatte 350 LB 70 B350xT380 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 30 - 32cm Rahmen Abduktion SB 28 - 32cm	1 St.
1h	20 461 88	Therapietischplatte 400 LB 100 B400xT400 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 34 - 36cm Rahmen Abduktion SB 34 - 36cm	1 St.
1i	20 461 89	Therapietischplatte 450 LB 150 B450xT450 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 38 - 48cm Rahmen Abduktion SB 38 - 48cm	1 St.
2 - 24	20 461 05	Halterung für Therapietisch am Rahmen geklemmt kpl Tischaufnahme mit Halterung / Gestänge und Klemmhalter für Rahmen Ø23mm (ohne Therapietischplatte) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
2a	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch bei SB 20 – 22cm	1 St.
2b	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch ab SB 24cm	2 St.
3a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
3b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 ab SB 24cm	4 St.
4a	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz bei SB 20 – 22cm	2 St.
4b	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz ab SB 24cm	4 St.

5a	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2	bei SB 20 – 22cm	2 St.
5b	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2	ab SB 24cm	4 St.
6 – 19	20 461 20	Führungsrohr rechts für Therapietisch SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?		1 St.
6 – 19	20 461 30	Führungsrohr links für Therapietisch SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?		1 St.
6	20 461 21	Teleskoprohr (Führungsrohr) rechts / links		2 St.
7	20 461 22	Drehpunktaufnahme für Teleskoprohr		2 St.
8	20 461 23	Drehpunktaufnahme für Klemmhalter		2 St.
9	01 154 20	Linsenkopfschraube M6x12 – ISO 7380 ZNS		4 St.
10	01 156 69	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380F ZNS		2 St.
11	01 320 62	Scheibe A6,4 – ISO 7090 ZNS		2 St.
12	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS		2 St.
13	01 154 40	Linsenkopfschraube M8x20 – ISO 7380 ZNS		2 St.
14	01 320 63	Scheibe A8,4 – ISO 7090 ZNS		2 St.
15a	20 461 51	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 1 Rahmen gerade SB 20 – 24cm		2 St.
15b	20 461 52	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 2 Rahmen gerade SB 26 – 32cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm		2 St.
15c	20 461 53	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 3 Rahmen gerade SB 34 – 42cm Rahmen Abduktion SB 26 – 32cm		2 St.
15d	20 461 54	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 4 Rahmen gerade SB 44 – 46cm Rahmen Abduktion SB 34 – 38cm		2 St.
15e	20 461 55	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 5 Rahmen Abduktion SB 40 – 46cm		2 St.
16 – 19	U24 212 30	Klemmschelle rechte Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)		1 Set
16 – 19	U24 212 20	Klemmschelle linke Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)		1 Set
16	U24 212 23	Klemmschelle rechts / links		2 St.
17	01 190 05	Klemmhebel M6x20 klein		2 St.
18	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS		2 St.
19	01 131 07	Gewindestift – M4x4 – ISO 4026 A2		2 St.
20 – 24	20 461 10	Klemmhalter für Therapietisch kpl. Klemmhalter für Ø23mm-Rohr (rechts und links verwendbar)		2 St.
20	20 461 11	Schenkel rechts / links		4 St.

JUNIOR2 AR / SLT

21	01 190 07	Klemmhebel M6x35 klein	2 St.
22	01 156 61	Linsenkopfschraube M6x6 – ISO 7380F ZNS	2 St.
23	02 110 54	Druckfeder	2 St.
24	20 461 12	Abstandsbuchse	2 St.

Therapeutisch gesteckt am Rahmen

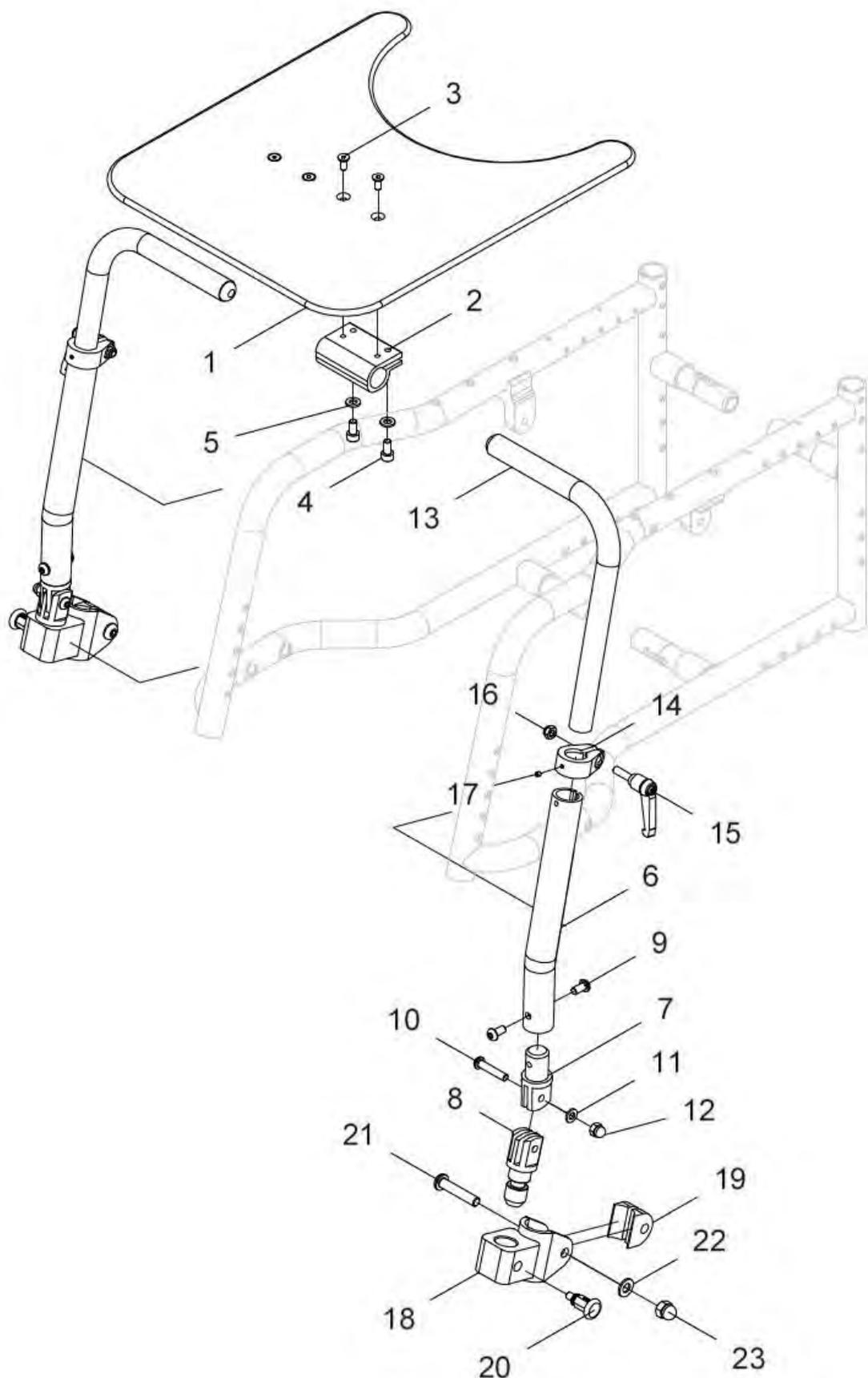


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 23	20 462 00	Therapietisch steckbar mit Halterung am Rahmen gesteckt kpl. Therapietischplatte PC mit Halterung / Gestänge und mit Führungsrohrhalter für Rahmen Ø23mm SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1 - 5	20 461 40	Therapietischplatte mit Tischaufnahme kpl. Therapietischplatte PC mit Tischaufnahme (ohne Halterung / Gestänge) SB: ?	1 St.
1a	20 461 42	Therapietischplatte XS B250xT300 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 20 – 22cm	1 St.
1b	20 461 43	Therapietischplatte S B250xT300 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 24cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm	1 St.
1c	20 461 44	Therapietischplatte M B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 26 – 30cm Rahmen Abduktion SB 26 – 30cm	1 St.
1d	20 461 45	Therapietischplatte L B400xT400 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 32 – 40cm Rahmen Abduktion SB 32 – 40cm	1 St.
1e	20 461 46	Therapietischplatte XL B450xT450 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 42 – 46cm Rahmen Abduktion SB 42 – 46cm	1 St.
2 - 23	20 462 05	Halterung steckbar für Therapietisch am Rahmen gesteckt kpl. Tischaufnahme mit Halterung / Gestänge und Führungsrohrhalter für Rahmen Ø23mm (ohne Therapietischplatte) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
2a	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch bei SB 20 – 22cm	1 St.
2b	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch ab SB 24cm	2 St.
3a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
3b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 ab SB 24cm	4 St.
4a	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz bei SB 20 – 22cm	2 St.
4b	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz ab SB 24cm	4 St.
5a	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
5b	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2 ab SB 24cm	4 St.
6 – 17	20 461 20	Führungsrohr rechts steckbar für Therapietisch steckbar SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
6 – 17	20 461 30	Führungsrohr links steckbar für Therapietisch steckbar SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
6	20 461 21	Teleskoprohr (Führungsrohr) rechts / links	2 St.


7	20 461 22	Drehpunktaufnahme für Teleskoprohr	2 St.
8	20 462 21	Drehpunktaufnahme steckbar für Führungsrohrhalter	2 St.
9	01 154 20	Linsenkopfschraube M6x12 – ISO 7380 ZNS	4 St.
10	01 156 69	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380F ZNS	2 St.
11	01 320 62	Scheibe A6,4 – ISO 7090 ZNS	2 St.
12	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS	2 St.
13a	20 461 51	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 1 Rahmen gerade SB 20 – 24cm	2 St.
13b	20 461 52	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 2 Rahmen gerade SB 26 – 32cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm	2 St.
13c	20 461 53	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 3 Rahmen gerade SB 34 – 42cm Rahmen Abduktion SB 26 – 32cm	2 St.
13d	20 461 54	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 4 Rahmen gerade SB 44 – 46cm Rahmen Abduktion SB 34 – 38cm	2 St.
13e	20 461 55	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 5 Rahmen Abduktion SB 40 – 46cm	2 St.
14 – 17	U24 212 30	Klemmschelle rechte Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)	1 Set
14 – 17	U24 212 20	Klemmschelle linke Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)	1 Set
14	U24 212 23	Klemmschelle rechts / links	2 St.
15	01 190 05	Klemmhebel M6x20 klein	2 St.
16	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS	2 St.
17	01 131 07	Gewindestift – M4x4 – ISO 4026 A2	2 St.
18 – 23	20 462 10	Führungsrohrhalter für Therapietisch steckbar kpl. Führungsrohrhalter für Ø23mm-Rohr mit Rastbolzen (rechts und links verwendbar)	2 St.
18	20 462 11	Führungsrohrhalter	2 St.
19	26 191 62	Distanzstück	4 St.
20	01 133 24	Rastbolzen	2 St.
21	01 154 43	Linsenkopfschraube M8x40 – ISO 7380F ZNS	2 St.
22	01 320 63	Scheibe A8,4 – ISO 7090 ZNS	2 St.
23	01 210 74	Hutmutter M8 – DIN 986 ZNS	2 St.

Fußbrett

Gruppe 5

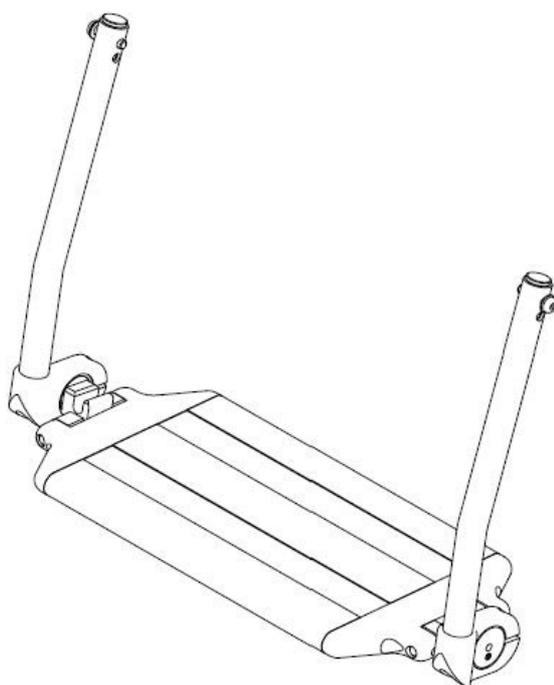

Fußbrett durchgehend Alu-Profil

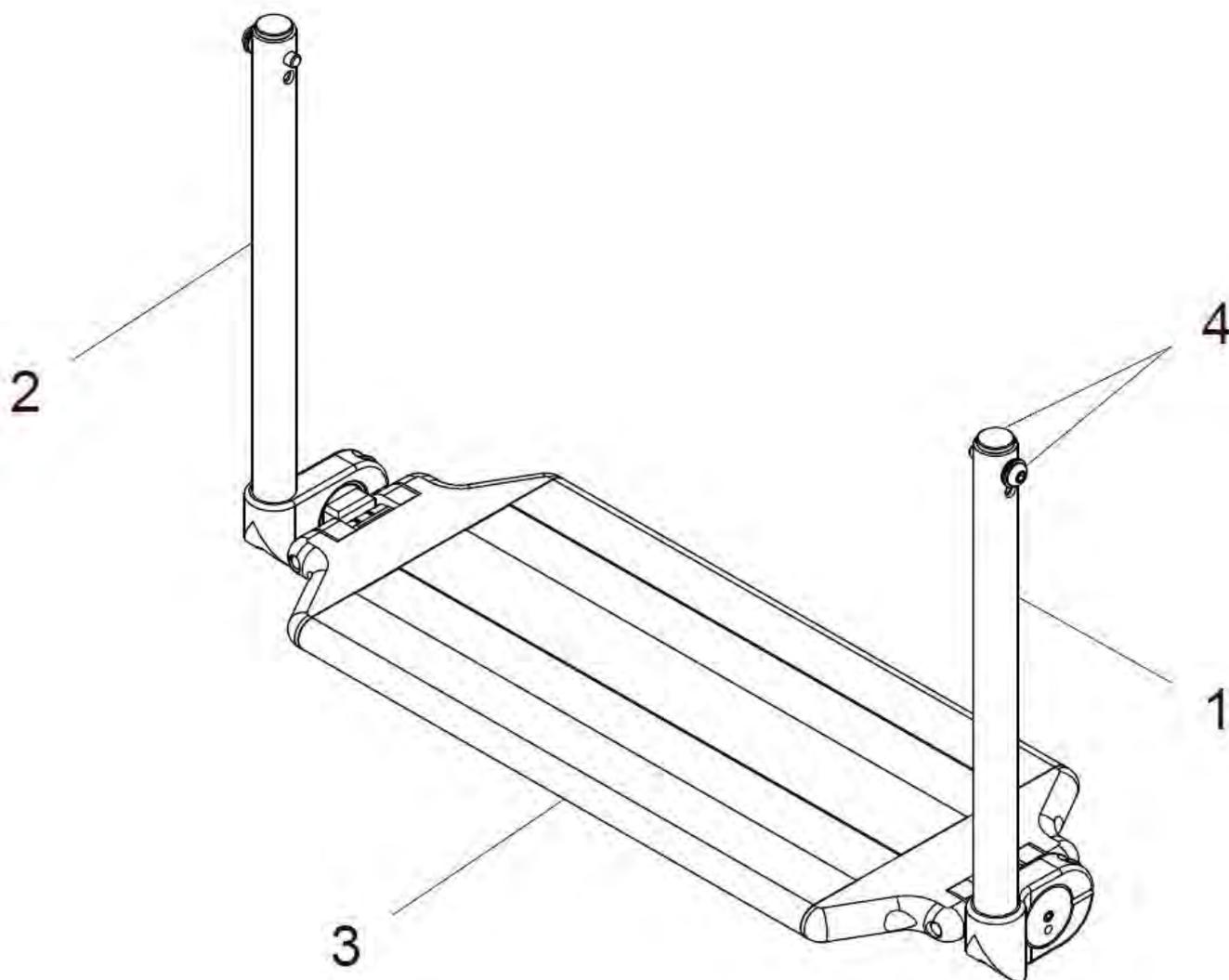


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 510 50	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel für Rahmen gerade FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 4	22 510 60	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel für Rahmen Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: Abduktion SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set

Sonder-Fußbrettbügel aus Stahl mit Klemmaufnahme:


1e	50 525 55	Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm)	1 St.
1f	50 525 60	Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm)	1 St.
2e	50 524 55	Fußbrettbügel Stahl gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm)	1 St.
2f	50 524 60	Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm)	1 St.

Fußbrett durchgehend mit FB-Halter Sprint (für JUNIOR2 AR)

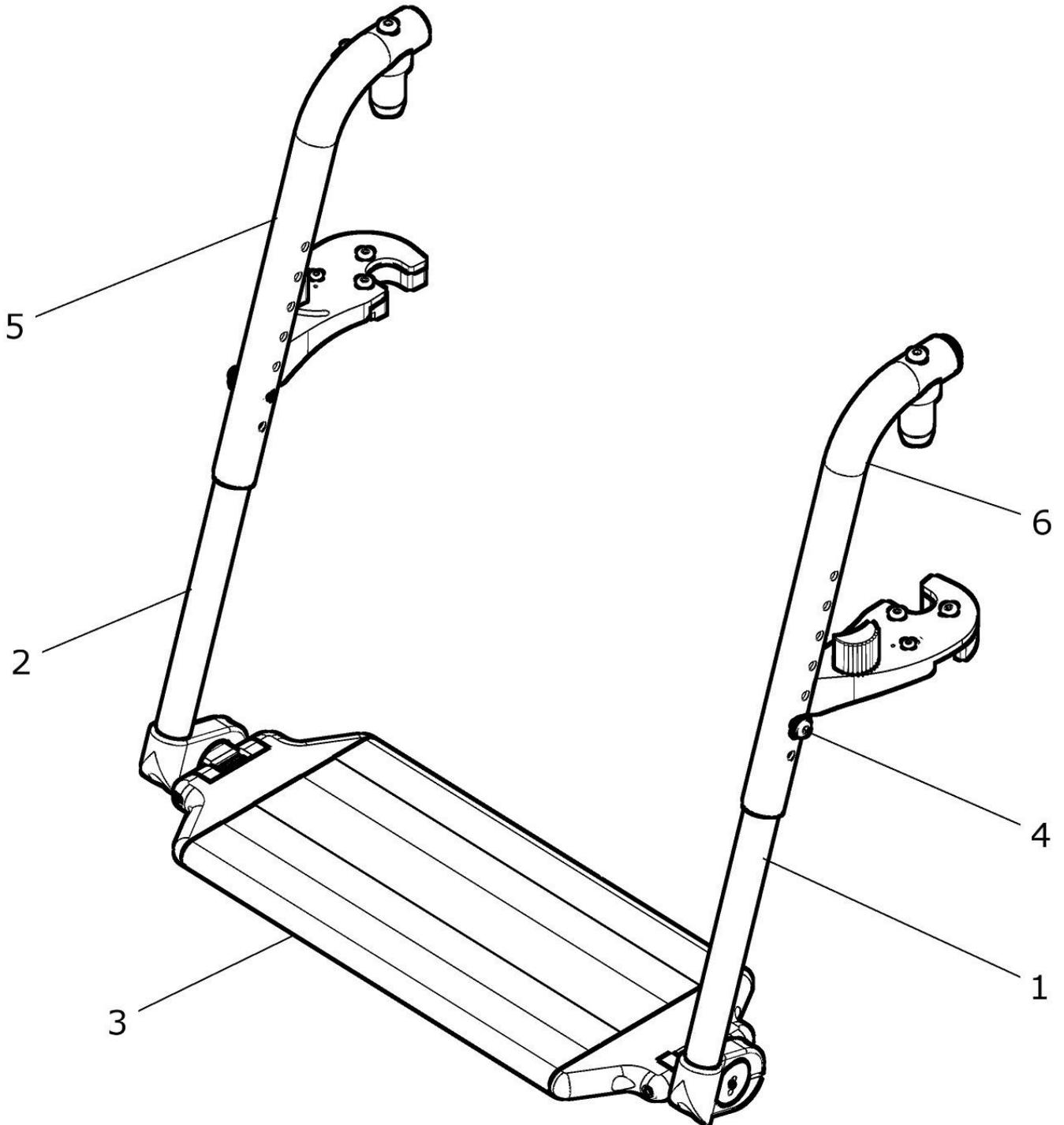

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	50 520 70	Fußbrett durchgehend (Profil) mit FB-Bügel und FB-Halter kpl. mit Fußbrettbügel und Fußbretthalter mit SPRINT-Verriegelung SB.: ? FM FB-Halter: ? FM FB-Profil: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 - 4	40 520 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel (ohne Fußbretthalter) FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	1 St.
5	50 512 00	Fußbretthalter rechts mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.
6	50 513 00	Fußbretthalter links mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.

Fußbrett (Profil) durchgehend

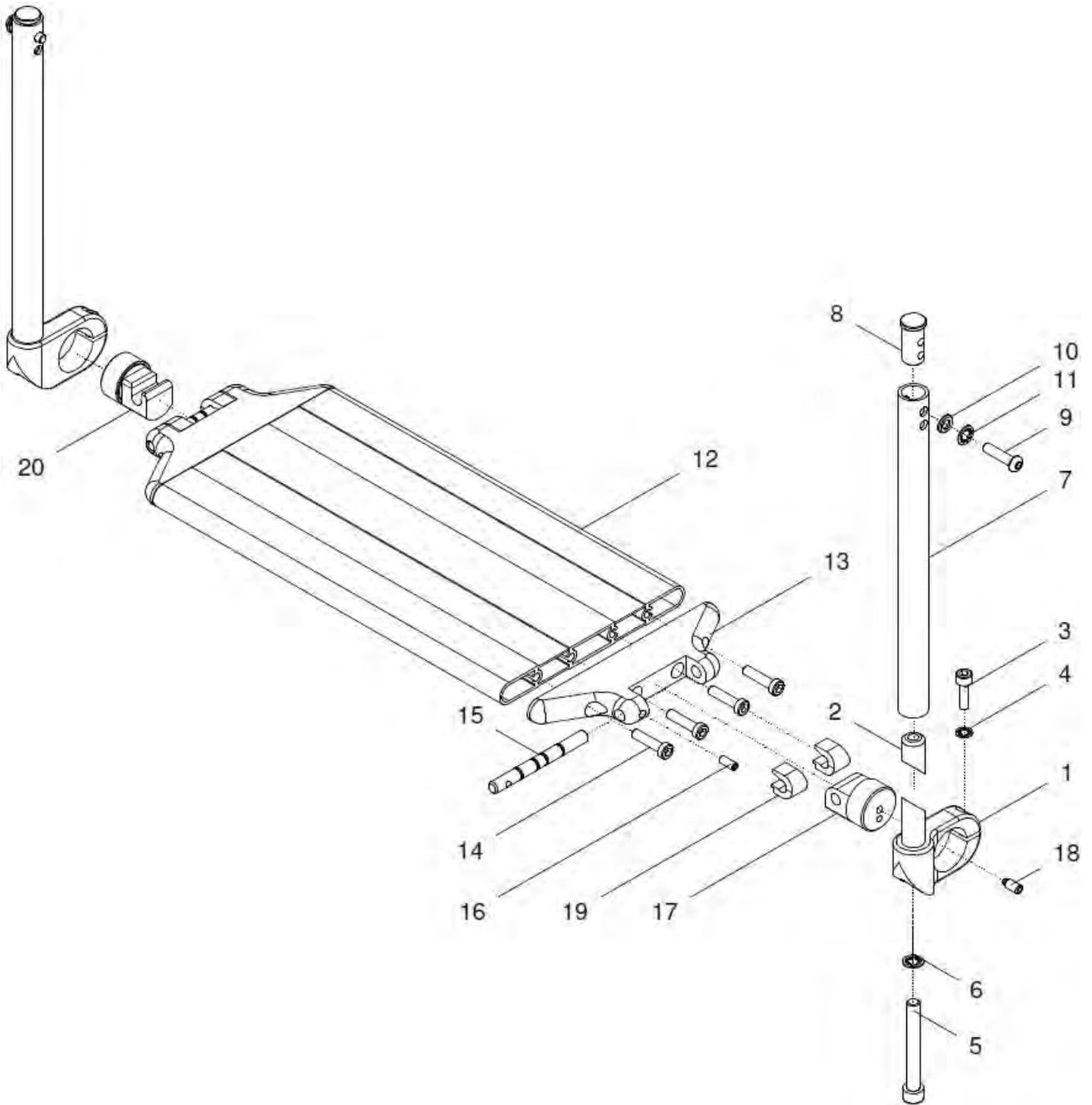

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	22 510 50	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel für Rahmen gerade FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 20	22 510 60	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel für Rahmen Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: Abduktion SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b - 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b - 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b - 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b - 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.

7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorr Scheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 20	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 - 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13 - 16, 19 - 20	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel aus Stahl mit Klemmaufnahme:


links:

1a – 6, 7h	50 525 55	Fußbrettbügel Stahl <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7g	50 525 60	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7e	50 525 68	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7f	50 525 67	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> extra lang mit Klemm. links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.

rechts:

1b – 6, 7h	50 524 55	Fußbrettbügel Stahl <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7g	50 524 60	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnah. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7e	50 524 68	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnah. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7f	50 524 67	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> extra lang mit Klemm. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.


Fußbrett durchgehend mit Spastikerverriegelung

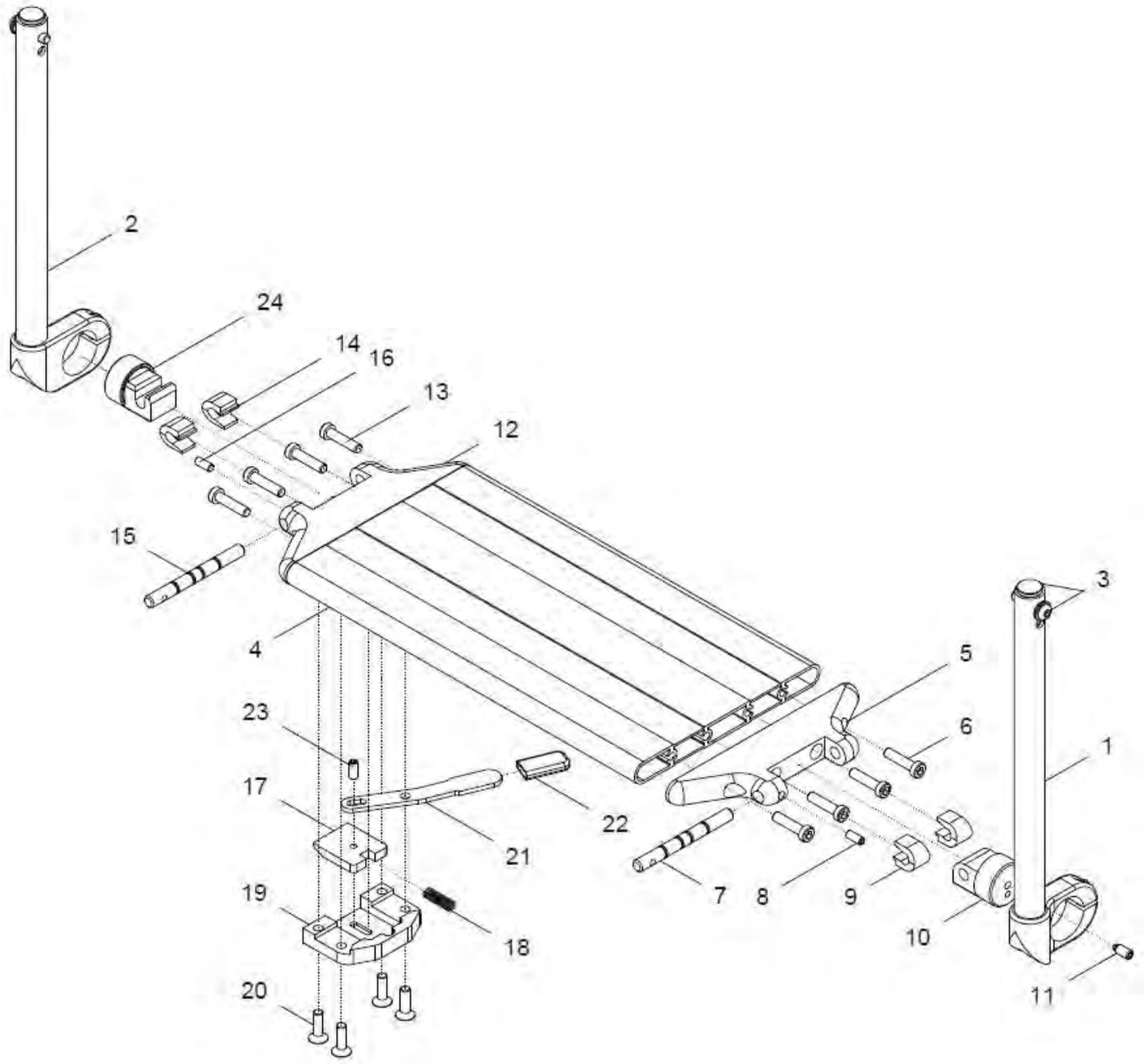

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	40 550 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung kpl. Fußbrett-Profil mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 - 24	40 552 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: ?	1 St.
4a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
4b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
5 - 11	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
5	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.

6	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
7	40 521 23	Drehachse	1 St.
8	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
9	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
10	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
11	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
12 – 24	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
12	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
13	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
14	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17 – 23	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
17	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
18	02 110 05	Druckfeder	1 St.
19	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
20	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
21	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
22	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
23	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
24	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.

Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus

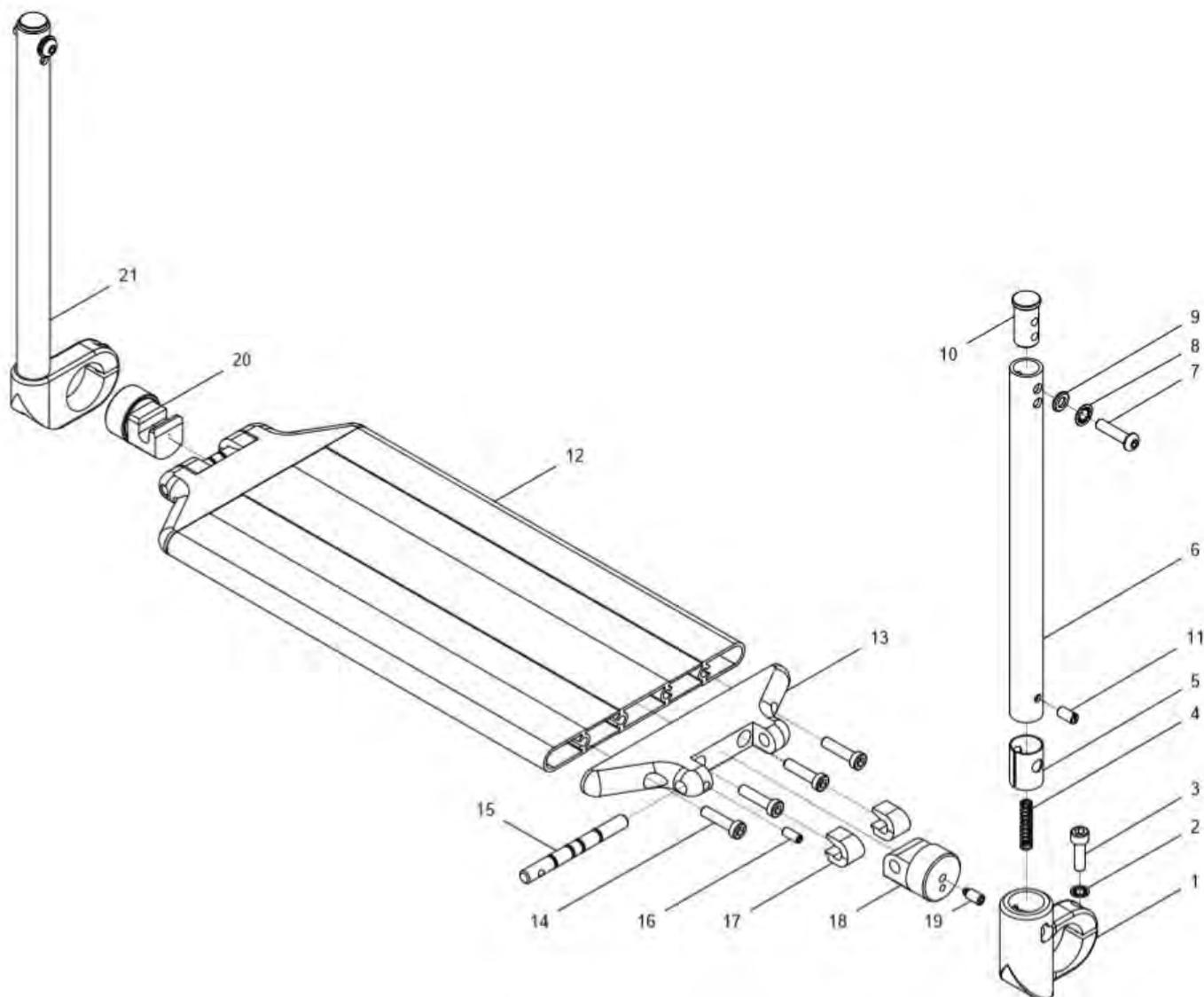


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 21a	40 520 40	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus links FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1a – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrsscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
12 – 20	40 521 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Gelenkbolzen und Auflager SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 – 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13 – 17, 20	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.
21a	40 526 50	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
21b	40 526 25	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.

Sonder-Ausführung: **Abschwenkmechanismus rechts**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1b – 21	40 520 50	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus rechts FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1b – 11	40 526 70	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1b – 11	40 526 20	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
21c	40 526 80	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
21d	40 526 35	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme links starr kpl. mit FB-Bügel links starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.


Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus und Spastiker- verriegelung

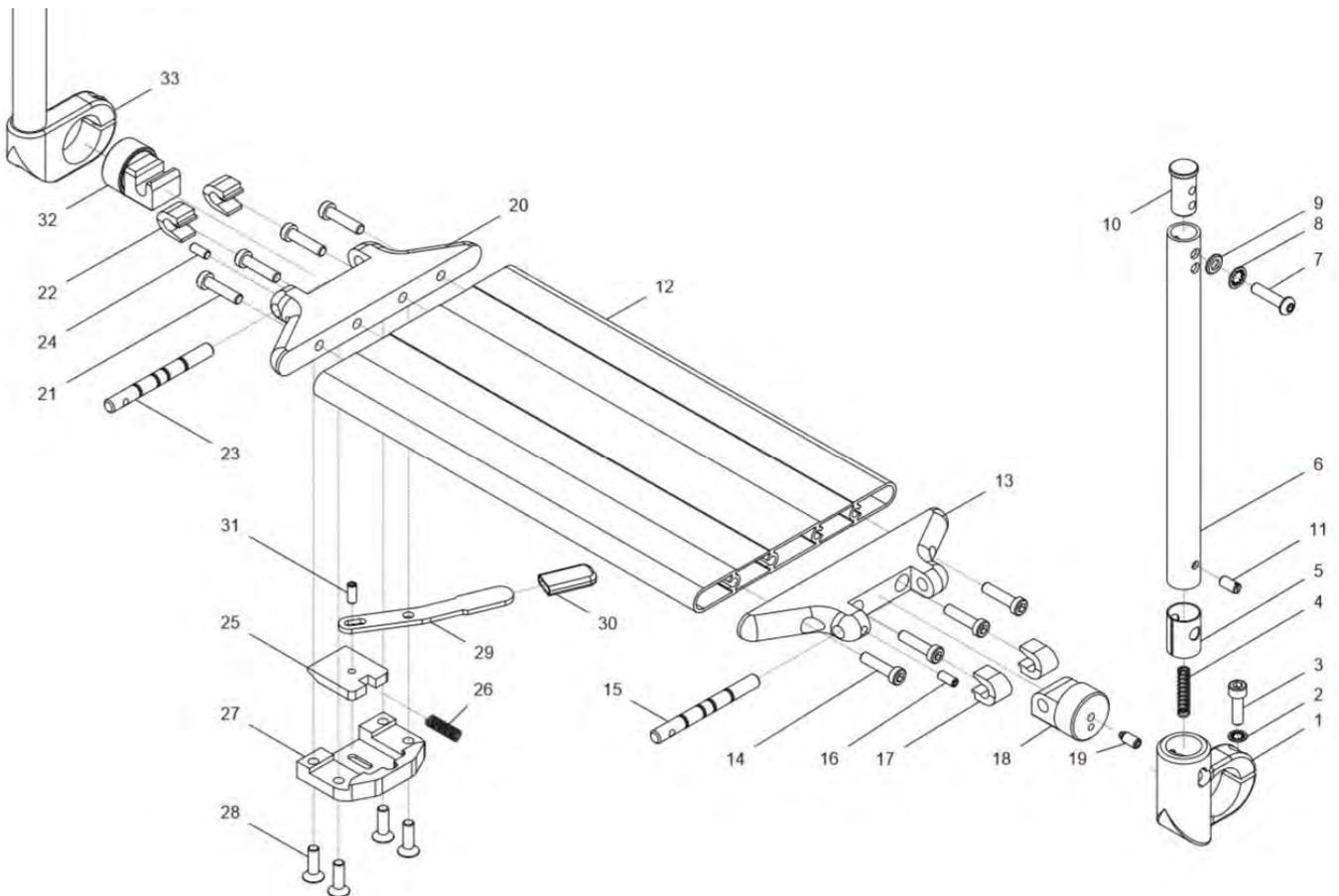

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 33	40 550 40	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Fußbrettbügel abschw. links und Abschwenkmechanismus links und Spastikerverriegelung rechts kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links kpl. FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1 – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links kpl. FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschw. (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschw.	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschw.	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschw.	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschw.	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorr-Scheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
12 – 32	40 552 00	Fußbrett durchgehend (Profil) mit Spastikerverriegelung (ohne Fußbrettbügel; ohne Fußbretthalter) kpl. SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12a	40 521 31	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

12b	40 521 36	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 - 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
20 - 32	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
20	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
21	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
22	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
23	40 521 23	Drehachse	1 St.
24	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
25 - 31	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
25	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
26	02 110 05	Druckfeder	1 St.
27	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
28	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
29	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
30	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
31	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
32	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.
33a	40 526 50	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
33b	40 526 25	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.

Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil)

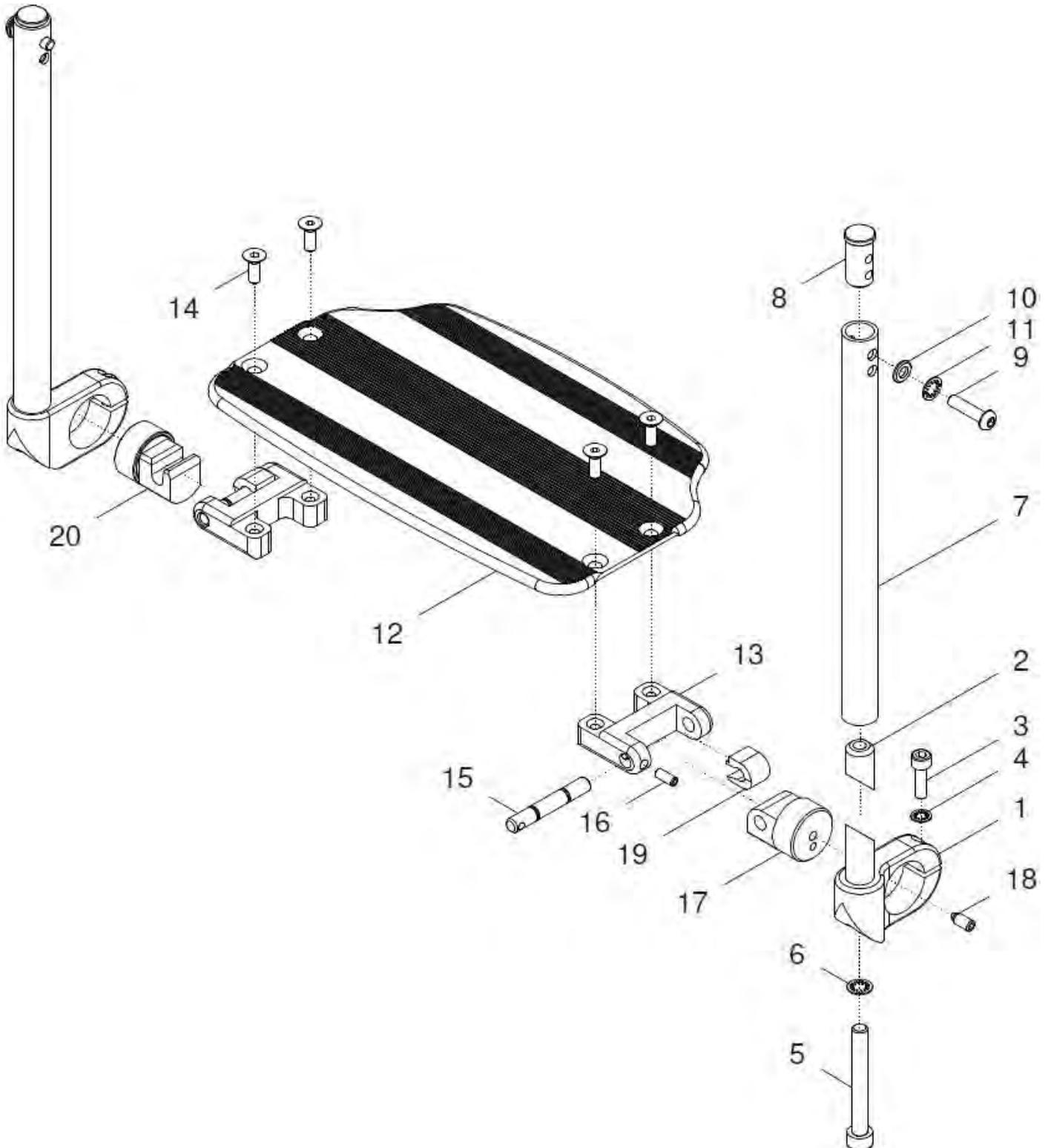


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 571 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b - 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b - 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b - 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b - 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set

8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 – 20	45 561 10	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12	45 561 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13 – 19	45 561 30	Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen (linke Seite) kpl.	1 St.
13 – 16, 19 - 20	45 561 20	Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen (rechte Seite) kpl.	1 St.
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Fußbrettplatte durchgehend mit Fußbrettbügel hochklappbar

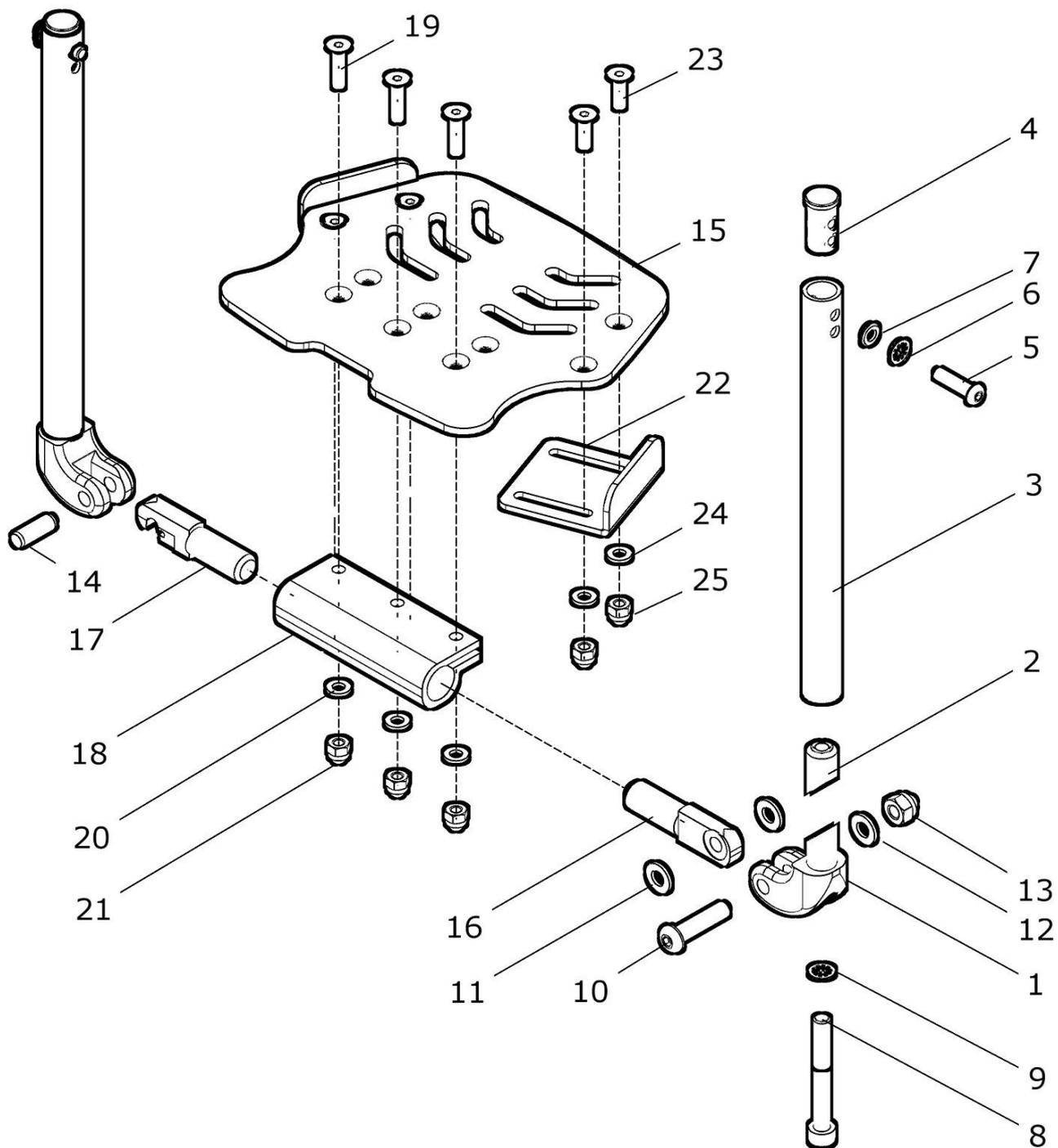


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 510 00	Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar mit Fußbrettbügel hochklappbar, Rahmen gerade FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	kpl. 1 St.
1 – 21	22 510 10	Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar mit Fußbrettbügel hochklappbar, Rahmen Abduktion FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	kpl. 1 St.
1 – 13	40 563 00	Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme links mit Linsenkopfschraube FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	kpl. 1 St.
1 – 13	40 563 10	Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme links und Linsenkopfschraube FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	kpl. 1 St.
1 – 9, 14	40 562 00	Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts und Zylinderstift FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	kpl. 1 St.
1 – 9, 14	40 562 10	Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme rechts und Zylinderstift FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	kpl. 1 St.
1	45 511 03	Aufnahme für Fußbrett	2 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
3b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
3c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
3d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
4 - 7	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 160 83B	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912	2 St.
9	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.

13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
15 - 21	40 561 00	Fußbrettplatte durchgehend mit Drehgelenk und Hacken kpl. SB: ? FM: ?	1 St.
15a	85 515 19	Fußbrettplatte 160mm durchgehend Rahmen gerade: SB 26 – 28cm FM.: ?	1 St.
15b	85 515 11	Fußbrettplatte 200mm durchgehend Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 24 – 26cm FM.: ?	1 St.
15c	85 515 12	Fußbrettplatte 240mm durchgehend Rahmen gerade: SB 34 – 38cm Abduktionsrahmen: SB 28 – 32cm FM.: ?	1 St.
15d	85 515 13	Fußbrettplatte 280mm durchgehend Abduktionsrahmen: SB 34 – 38cm FM.: ?	1 St.
16	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
17	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
18	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
19	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
21	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Optional:

22 - 25	70 520 50	Seitenschutz für Fußbrettplatte kpl.	1 Set
22	70 521 03	Seitenschutz	2 St.
23	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
25	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	4 St.


Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert

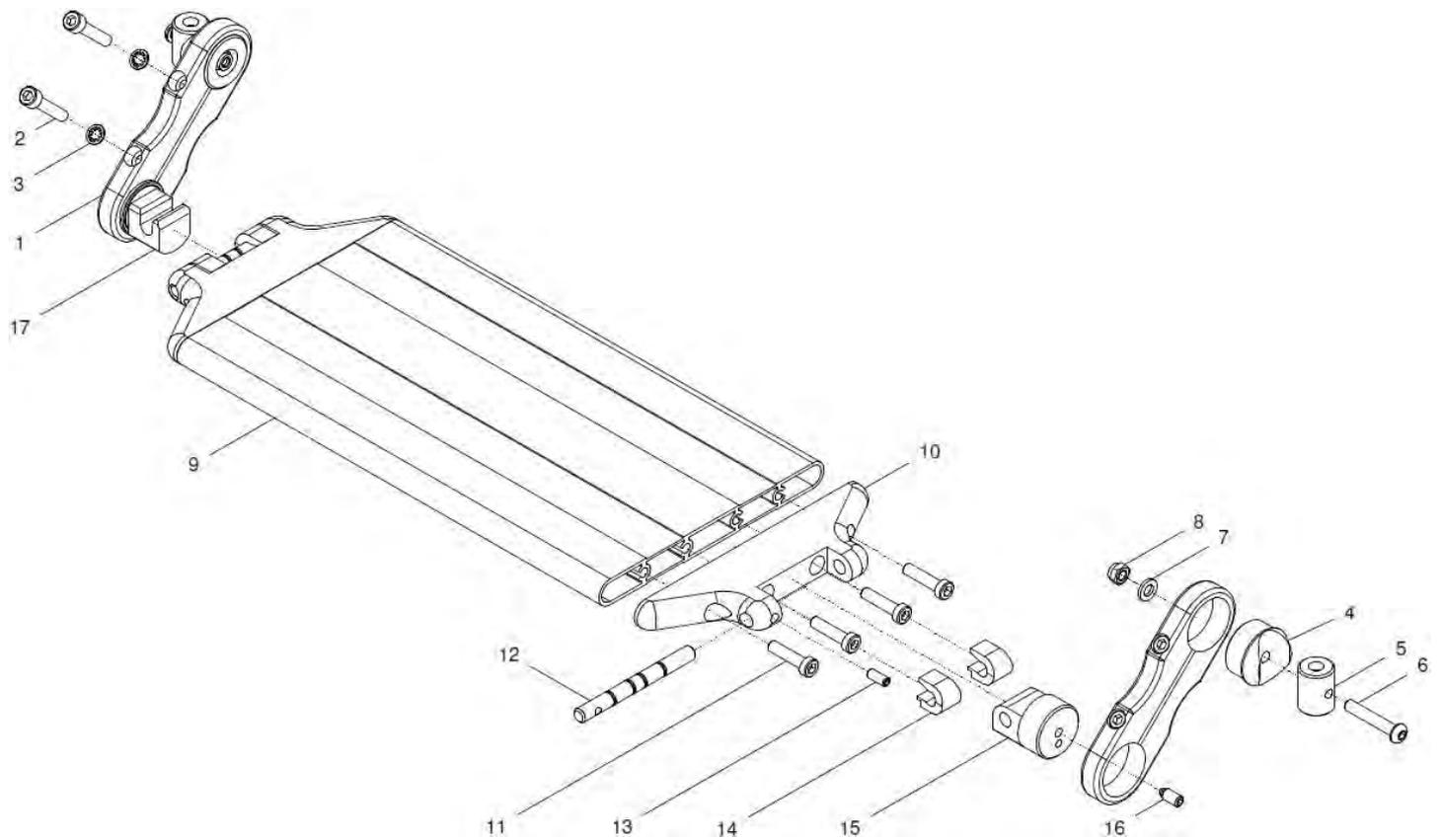

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 520 50	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen montiert ger. kpl. Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 - 17	22 520 60	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen montiert Abd- kpl. Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a - 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 17	22 522 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
9a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

9b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
10 – 16	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
10 – 14, 17	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
10	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
12	40 521 23	Drehachse	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
15	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
16	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
17	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.


Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen mit Spastikerverriegelung

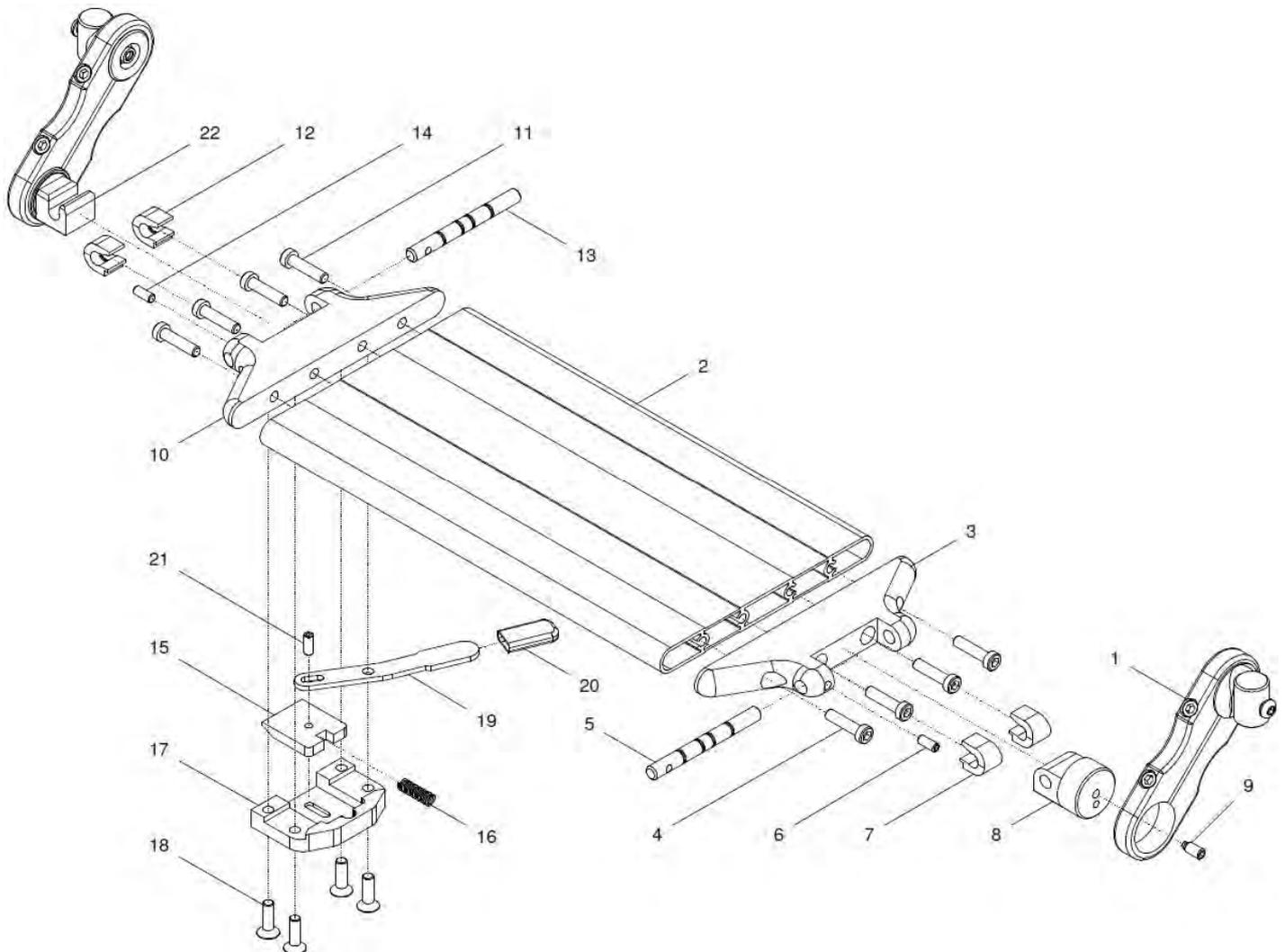

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 520 55	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen, mit Spastik. kpl. Fußbrett-Profil im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlasche, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 - 22	22 520 65	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen, Spastik. kpl. Fußbrett-Profil im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
2 – 22	22 526 00	Fußbrett durchgehend (Profil) im Rahmen, mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
2a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
2b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
3 – 9	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
3	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
4	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
5	40 521 23	Drehachse	1 St.
6	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.

7	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
8	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
9	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
10 – 22	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
10	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
12	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
13	40 521 23	Drehachse	1 St.
14	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
15 – 21	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
15	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
16	02 110 05	Druckfeder	1 St.
17	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
18	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
19	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
20	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
21	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
22	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.


**Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen)**

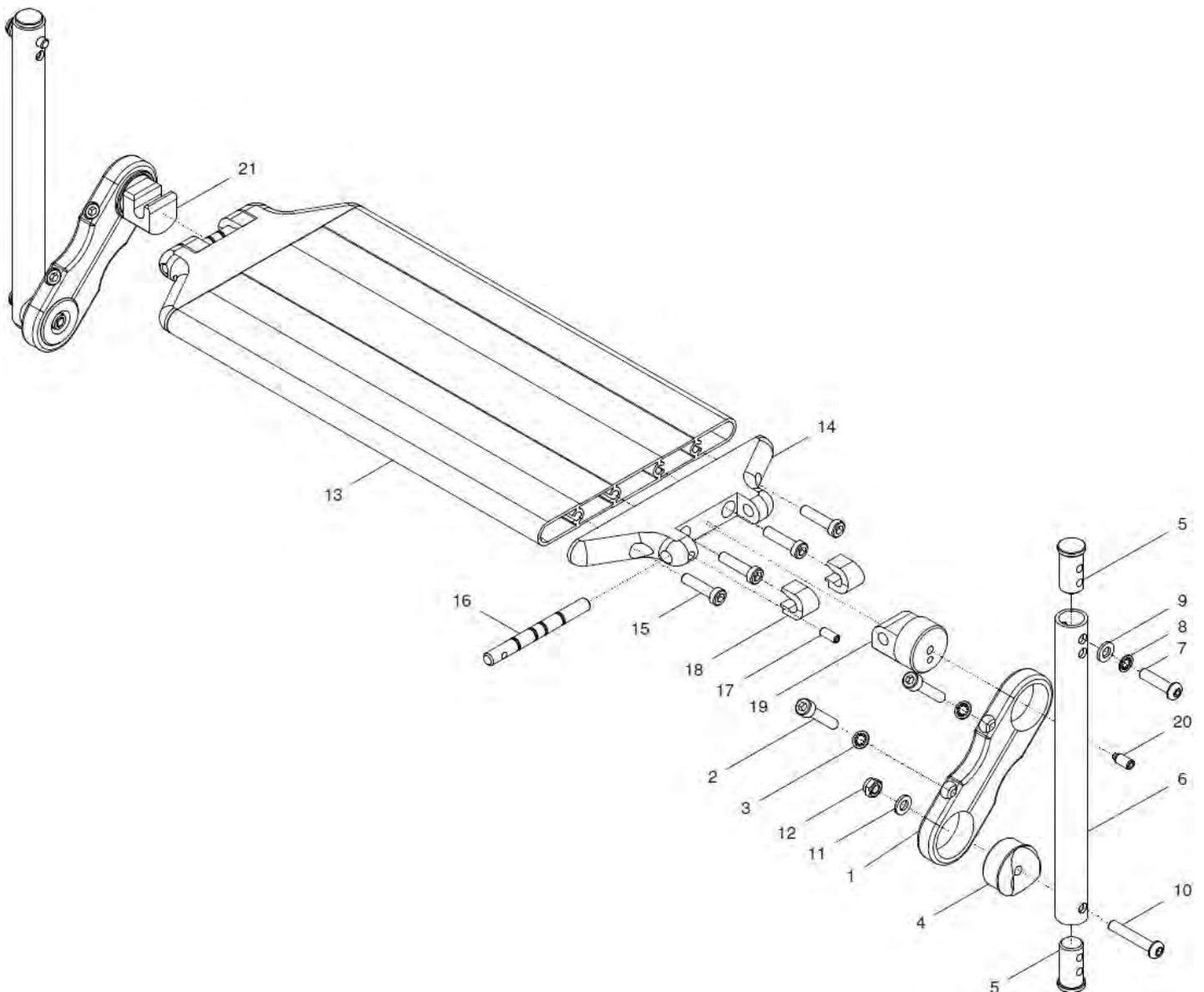

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 530 50	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) abgesetzt - gerade- Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	kpl. 1 St.
1 – 21	22 530 60	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) abgesetzt - Abduktion- Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	kpl. 1 St.
1 - 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	kpl. 2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 (ohne Klemmlasche)	kpl. 2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 21	22 522 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, Länge FB-Profil wie im Rahmen montiert SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

13b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 20	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14 – 18, 21	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
16	40 521 23	Drehachse	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
21	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.


**Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt mit Spastikerverriegelung
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen)**

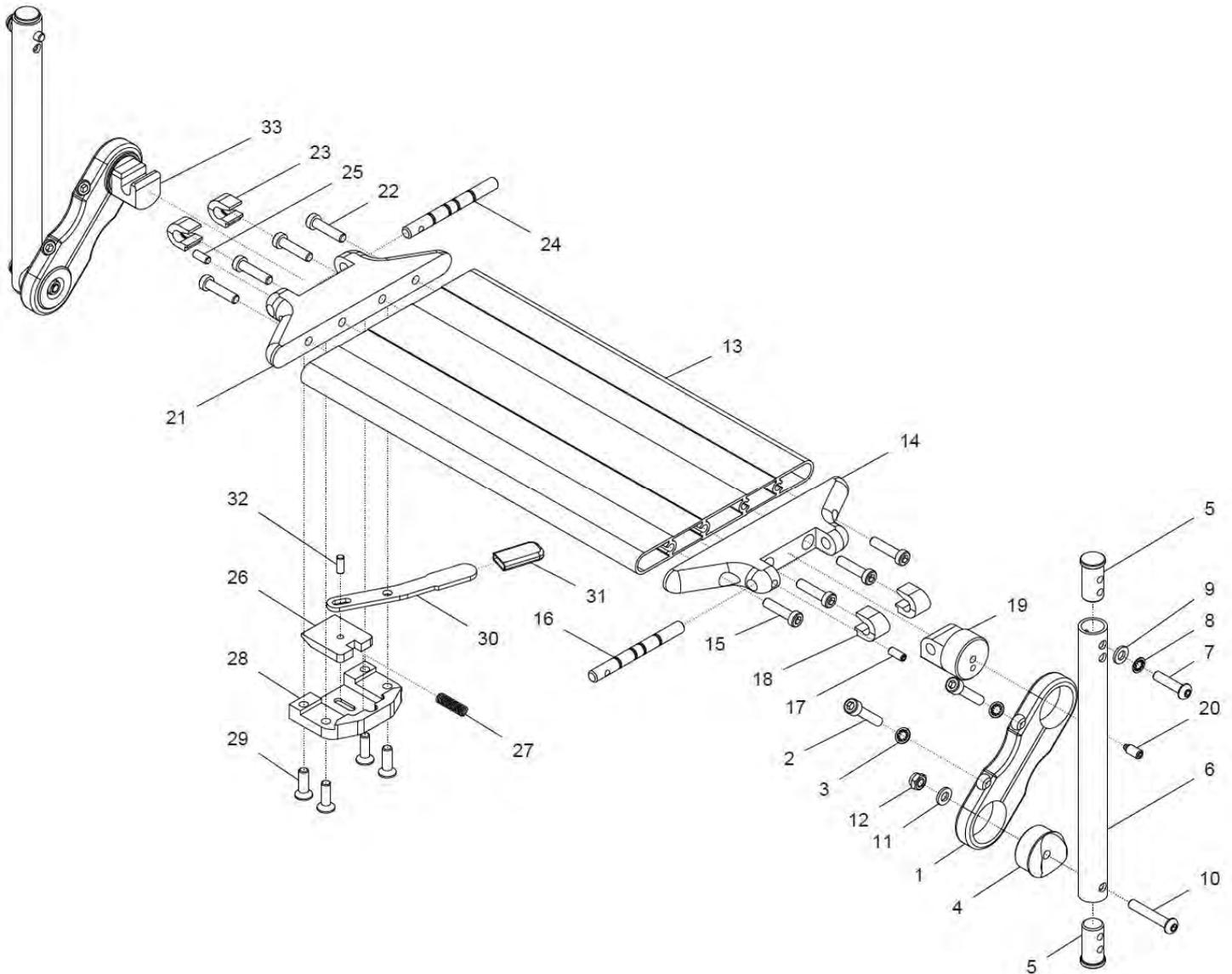

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12, 13a - 33	22 530 55	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) abgesetzt -gerade-, Spast. kpl. Fußbrett-Profil durchgehend mit Spastikerverriegelung für FB abgesetzt, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
1 – 12, 13b - 33	22 530 65	Fußbrett durchgehnd. (Alu-Profil) abgesetzt -Abduktion, Spast. kpl. Fußbrett-Profil durchgehend mit Spastikerverriegelung für FB abgesetzt, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 33	22 526 00	Fußbrett durchgehend (Profil) im Rahmen, mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
13a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

13b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 20	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
16	40 521 23	Drehachse	1 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
21 – 33	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
21	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
23	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
24	40 521 23	Drehachse	1 St.
25	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
26 – 32	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
26	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
27	02 110 05	Druckfeder	1 St.
28	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
29	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
30	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
31	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
32	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
33	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.


Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt und abschwenkbar
oder
Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert und abschwenkbar
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

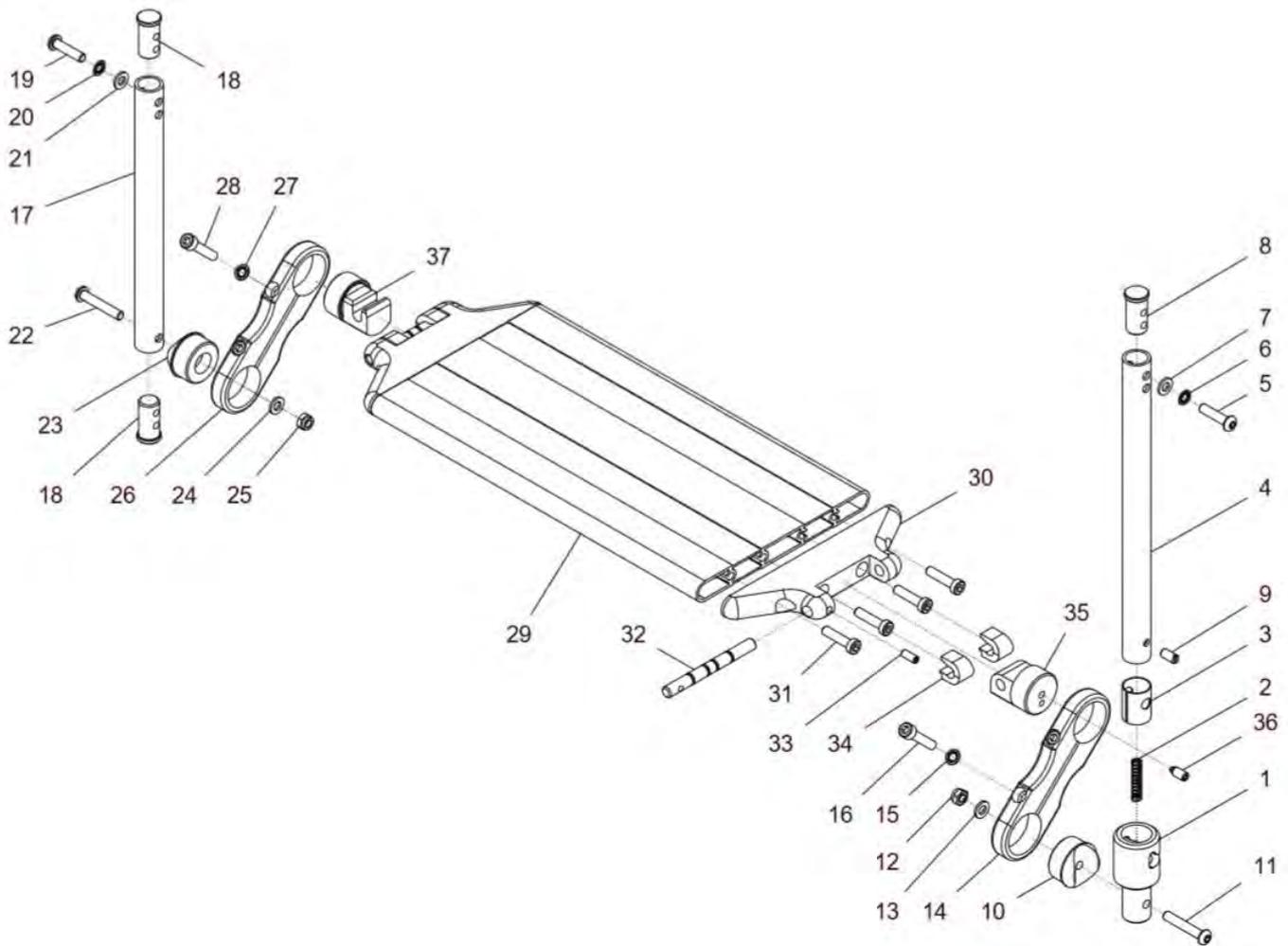

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 37	25 540 40	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen abschwenkbar kpl. Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ? SB: ?	1 St.
1 – 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschwenkbar und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 – 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschwenkbar kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschwenkbar	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 – 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 – 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 37	22 522 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen Länge FB-Profil wie im Rahmen montiert SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
29a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
29b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
30 – 36	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30 – 34, 37	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
31	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
32	40 521 23	Drehachse	2 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
34	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
35	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
36	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
37	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

**Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert / abgesetzt und
abschwenkbar und mit Spastikerverriegelung**
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

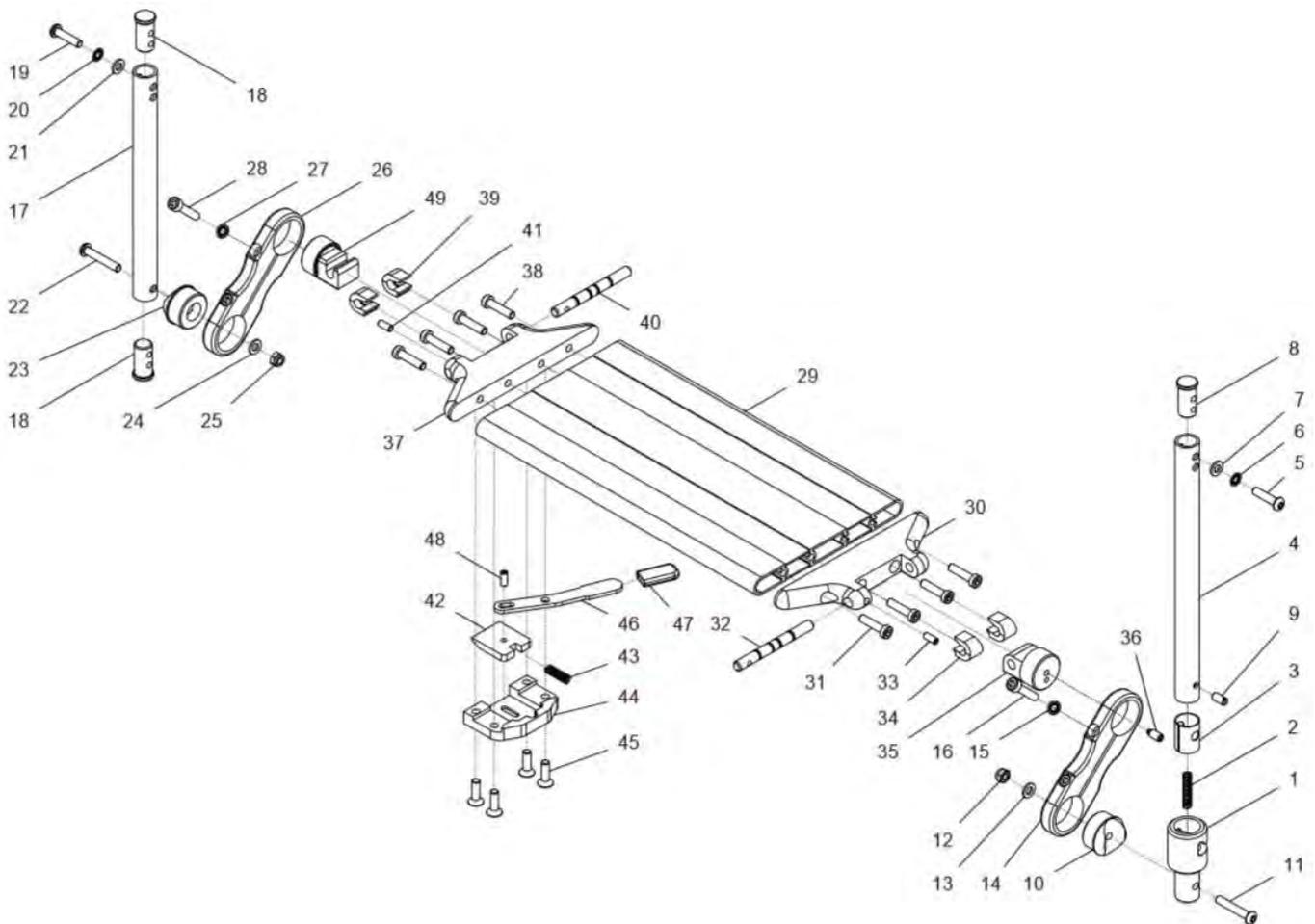


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 49	25 540 45	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) im Rahmen abschw./Spast. kpl. Fußbrett-Profil mit Spastikerverriegelung mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ? SB: ?	1 St.
1 – 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschwenkbar und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 – 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschwenkbar kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschwenkbar	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 49	22 526 00	Fußbrett durchgehend (Profil) im Rahmen, mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
29a	22 522 31	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
29b	22 522 36	Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
30 – 36	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
31	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
32	40 521 23	Drehachse	1 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
34	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
35	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
36	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
37 – 49	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
37	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
38	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.

39	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
40	40 521 23	Drehachse	1 St.
41	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
42 – 48	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
42	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
43	02 110 05	Druckfeder	1 St.
44	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
45	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
46	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
47	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
48	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
49	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.


Fußbrett flach durchgehend im Rahmen montiert (Flach-Profil)

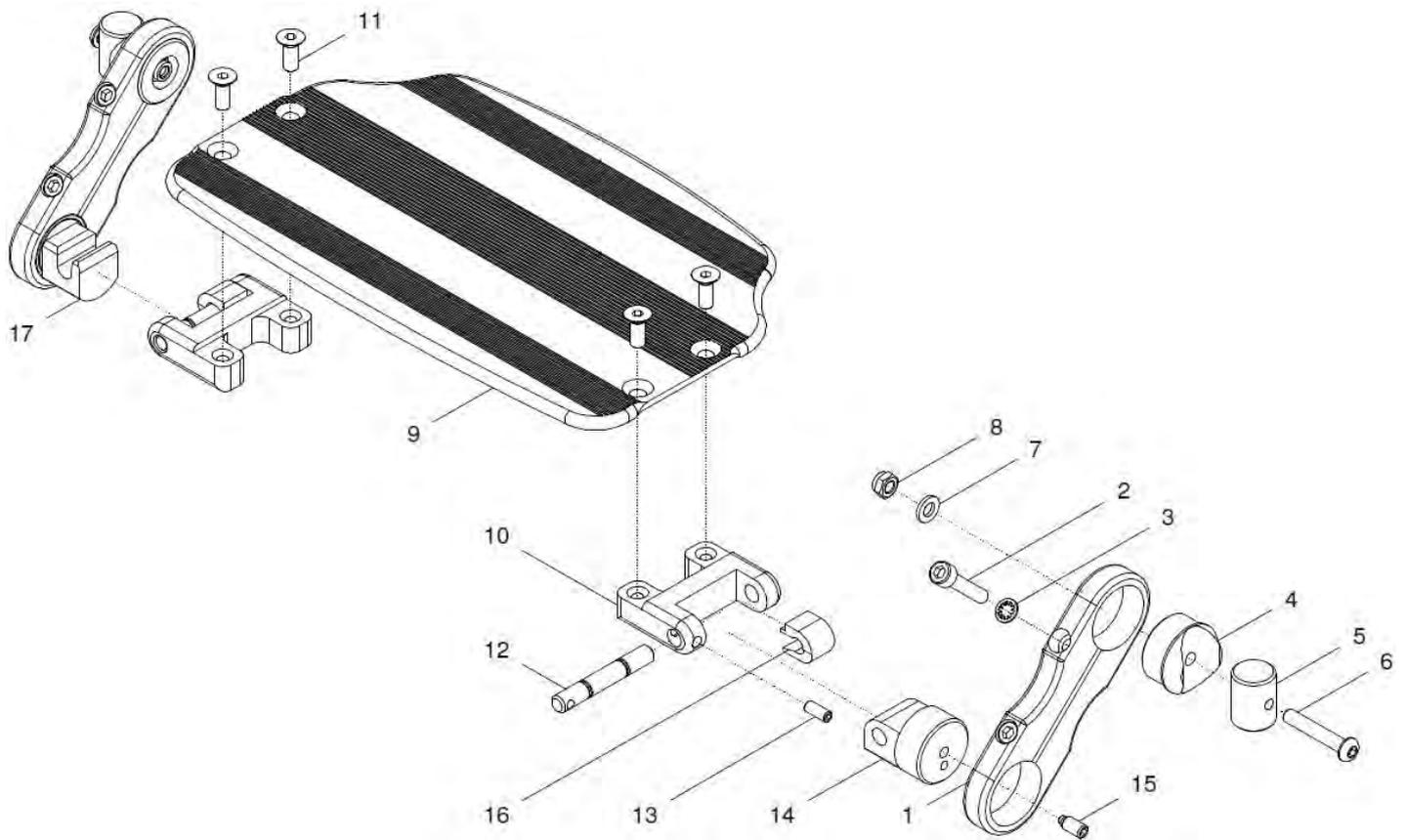

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 520 70	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) im Rahmen gerade kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 17	22 520 75	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) im Rahmen Abduktion kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b – 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c – 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 – 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 17	22 527 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
9	22 527 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur Montage: wie im Rahmen montiert	1 St.

10 – 16	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen (linke Seite)	kpl.	1 St.
10 – 13, 16 – 17	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen (rechte Seite)	kpl.	1 St.
10	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert		2 St.
11	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991		4 St.
12	45 561 22	Achsbolzen		2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913		2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil		1 St.
15	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM		1 St.
16	40 521 25	Distanzstück mit Nase		2 St.
17	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring		1 St.

Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt
(mit FB-Bügel und Klemmmasche)

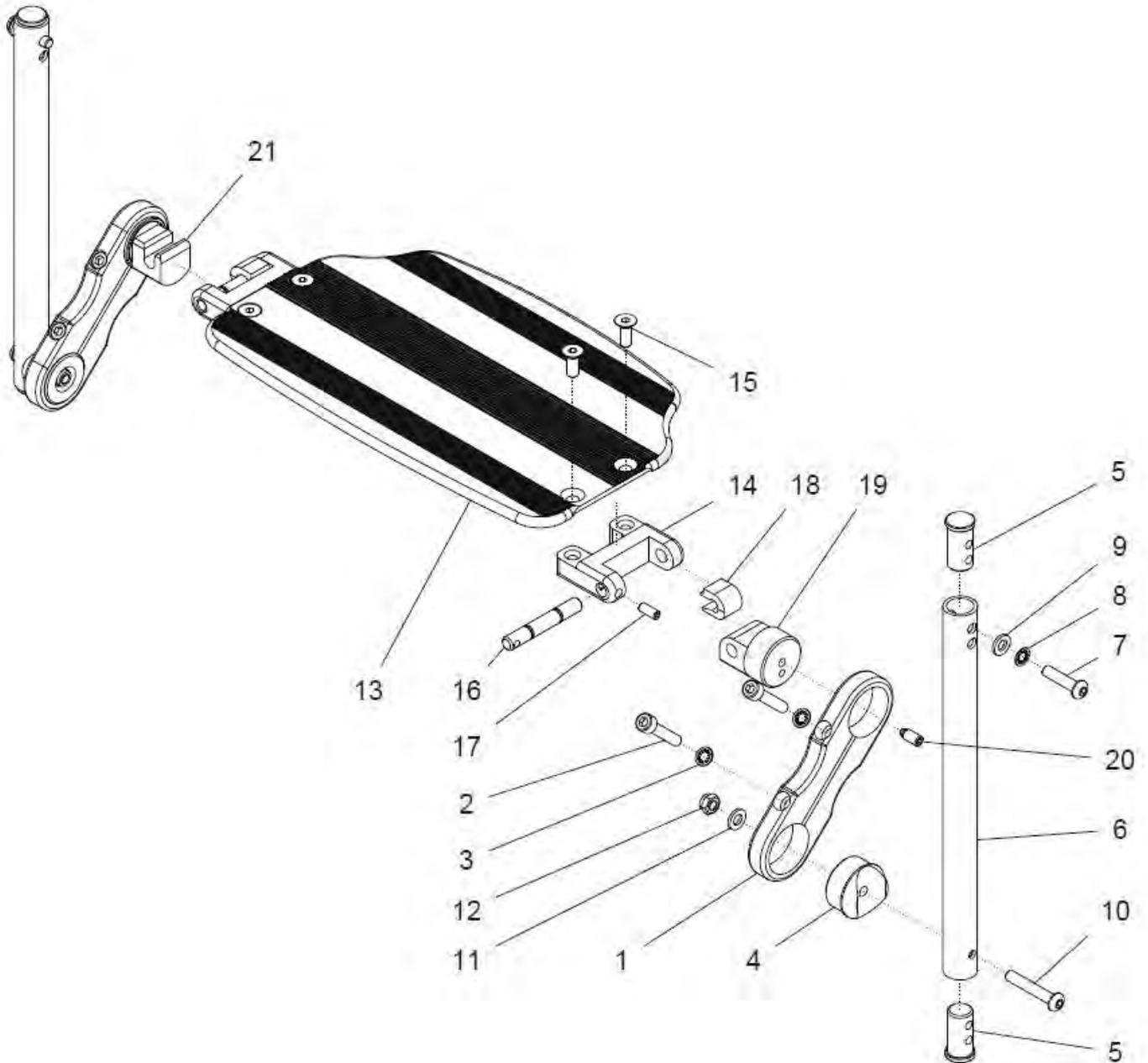


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 530 80	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) abgesetzt / gerade kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform gerade FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
1 – 21	22 530 85	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) abgesetzt / Abduktion kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 St.
1 - 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 21	22 527 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13	22 527 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur Montage: wie im Rahmen montiert	1 St.
14 – 20	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen kpl. (linke Seite)	1 St.

14 – 18, 21	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen (rechte Seite)	kpl.	1 St.
14	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert		2 St.
15	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991		4 St.
16	45 561 22	Achsbolzen		2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913		2 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase		2 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil		1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM		1 St.
21	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring		1 St.

**Fußbrett flach durchgehend abgesetzt / im Rahmen und abschwenkbar
(Flach-Profil)**


(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

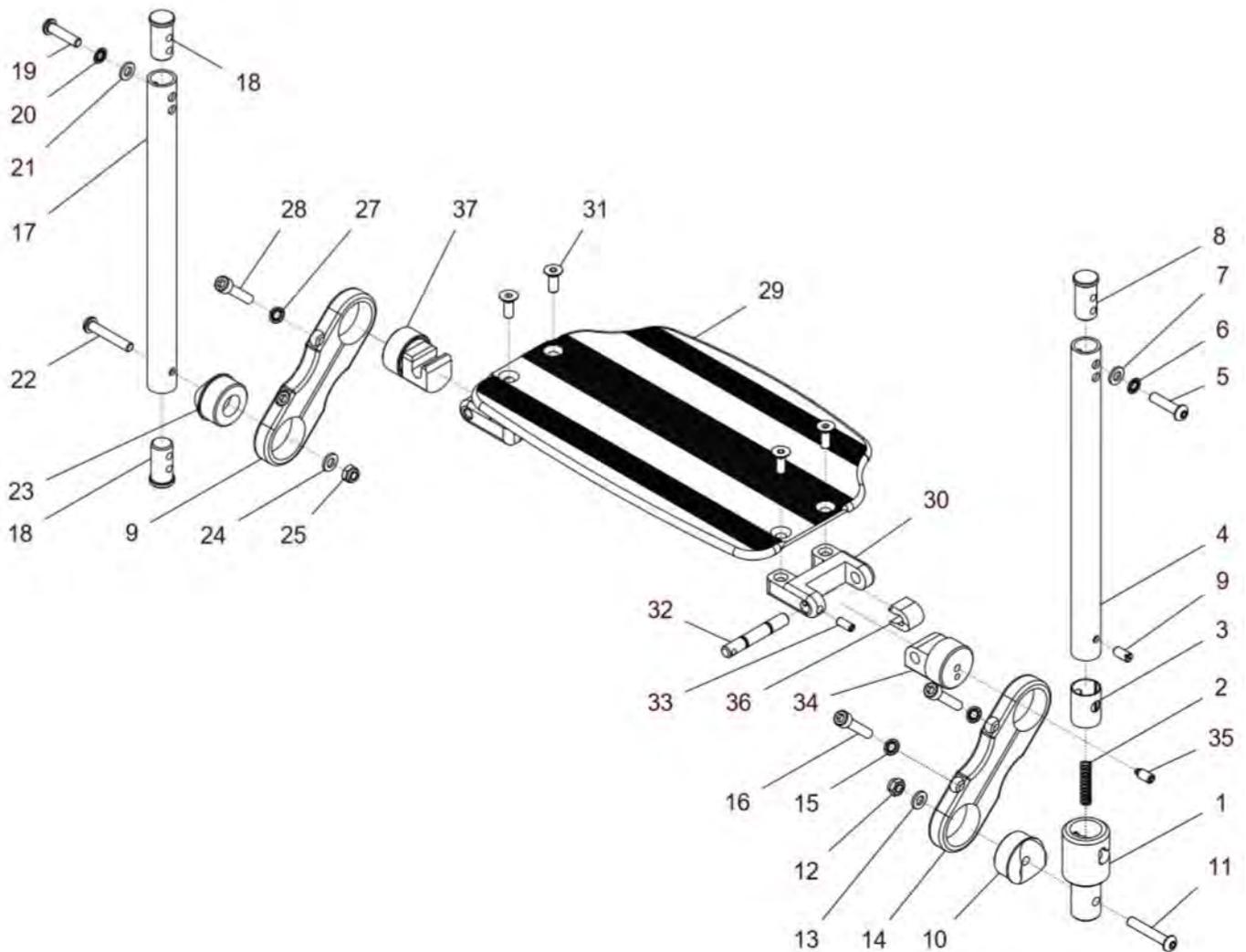

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 37	25 540 50	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) im R. abschwenkbar kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen 85mm im Rahmen montiert FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ? SB: ?	1 St.
1 - 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. u. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschwenkbar und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 - 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschwenkbar kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschwenkbar	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 37	22 527 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
29	22 527 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur Montage: wie im Rahmen montiert	1 St.
30 – 36	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen (linke Seite)	kpl. 1 St.
30 – 33, 36 – 37	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen (rechte Seite)	kpl. 1 St.
30	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettfachprofil im Rahmen montiert	2 St.
31	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
32	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
34	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
35	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
36	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
37	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.


Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert

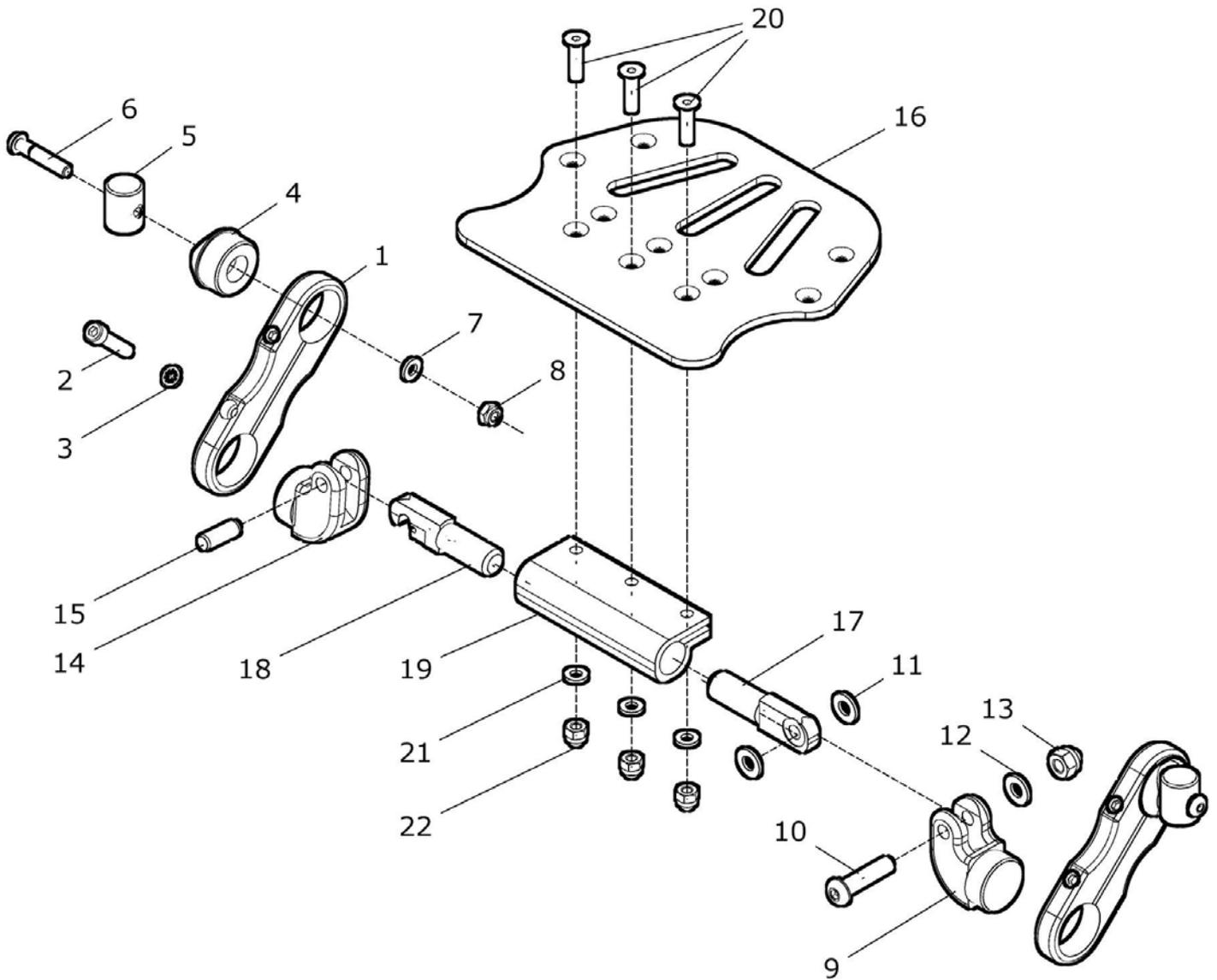

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 520 40	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert gerade kpl. Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 22	22 520 45	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert Abduktion kpl. Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a - 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 22	22 524 00	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen mit Gelenkbolzen kpl. mit Drehgelenk und Hacken und Gelenkbolzen rechts und links SB: ? FM: ?	1 St.
9 - 13	22 561 20	Gelenkbolzen mit Linsenkopfschraube	1 St.
9	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.

13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14 - 15	22 561 10	Gelenkbolzen mit Zylinderstift	1 St.
14	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
15	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
16 – 22	22 524 10	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert kpl. mit Drehgelenk und Hacken (ohne Gelenkbolzen) SB: ? FM: ?	1 St.
16a	85 515 19	Fußbrettplatte 160mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 26 – 28cm Abduktionsrahmen: SB 24 FM.: ?	1 St.
16b	85 515 11	Fußbrettplatte 200mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 26 – 28cm FM.: ?	1 St.
16c	85 515 12	Fußbrettplatte 240mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 34 – 36cm Abduktionsrahmen: SB 30 – 32cm FM.: ?	1 St.
16d	85 515 13	Fußbrettplatte 280mm durchgehend im Rahmen montiert Abduktionsrahmen: SB 34 – 36cm FM.: ?	1 St.
17	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
18	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
19	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
20	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
22	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert und abschwenkbar
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

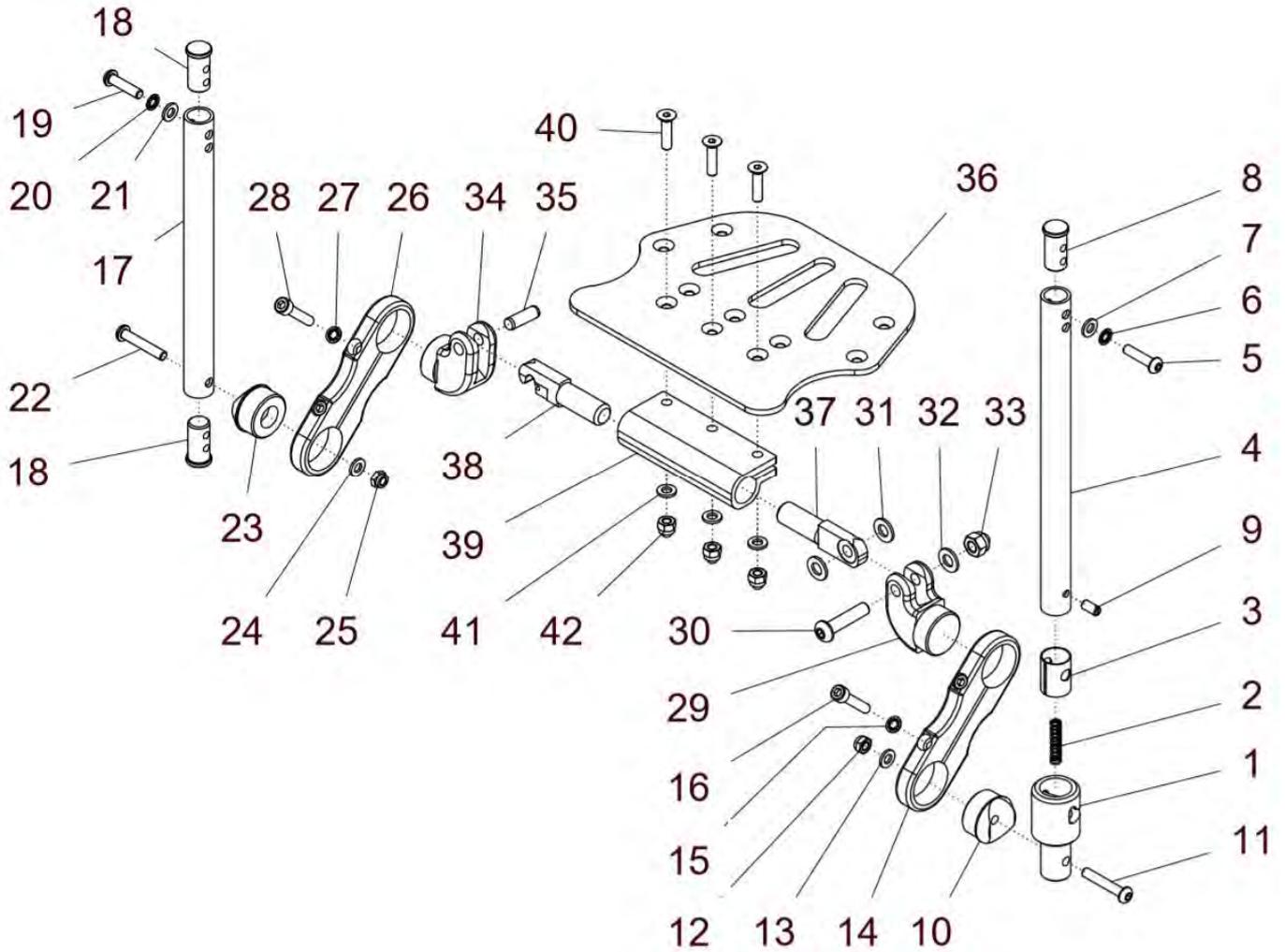


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 42	25 540 30	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen abschwenkbar kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen 85mm im Rahmen montiert SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 - 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschwenkbar und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 - 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschwenkbar kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschwenkbar	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 42	22 524 00	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen mit Gelenkbolzen kpl. mit Drehgelenk und Hacken und Gelenkbolzen rechts und links SB: ? FM: ?	1 St.
29 - 33	22 561 20	Gelenkbolzen mit Linsenkopfschraube	1 St.
29	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
30	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
31	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
32	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
33	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
34 - 35	22 561 10	Gelenkbolzen mit Zylinderstift	1 St.
34	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
35	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
36 – 42	22 524 10	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert kpl. mit Drehgelenk und Hacken (ohne Gelenkbolzen) SB: ? FM: ?	1 St.
36a	85 515 19	Fußbrettplatte 160mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 26 – 28cm Abduktionsrahmen: SB 24 FM.: ?	1 St.
36b	85 515 11	Fußbrettplatte 200mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 26 – 28cm FM.: ?	1 St.
36c	85 515 12	Fußbrettplatte 240mm durchgehend im Rahmen montiert Rahmen gerade: SB 34 – 36cm Abduktionsrahmen: SB 30 – 32cm FM.: ?	1 St.
36d	85 515 13	Fußbrettplatte 280mm durchgehend im Rahmen montiert Abduktionsrahmen: SB 34 – 36cm FM.: ?	1 St.


37	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
38	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
39	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
40	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
41	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
42	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Fußbretthalter (Sprint-Verriegelung)

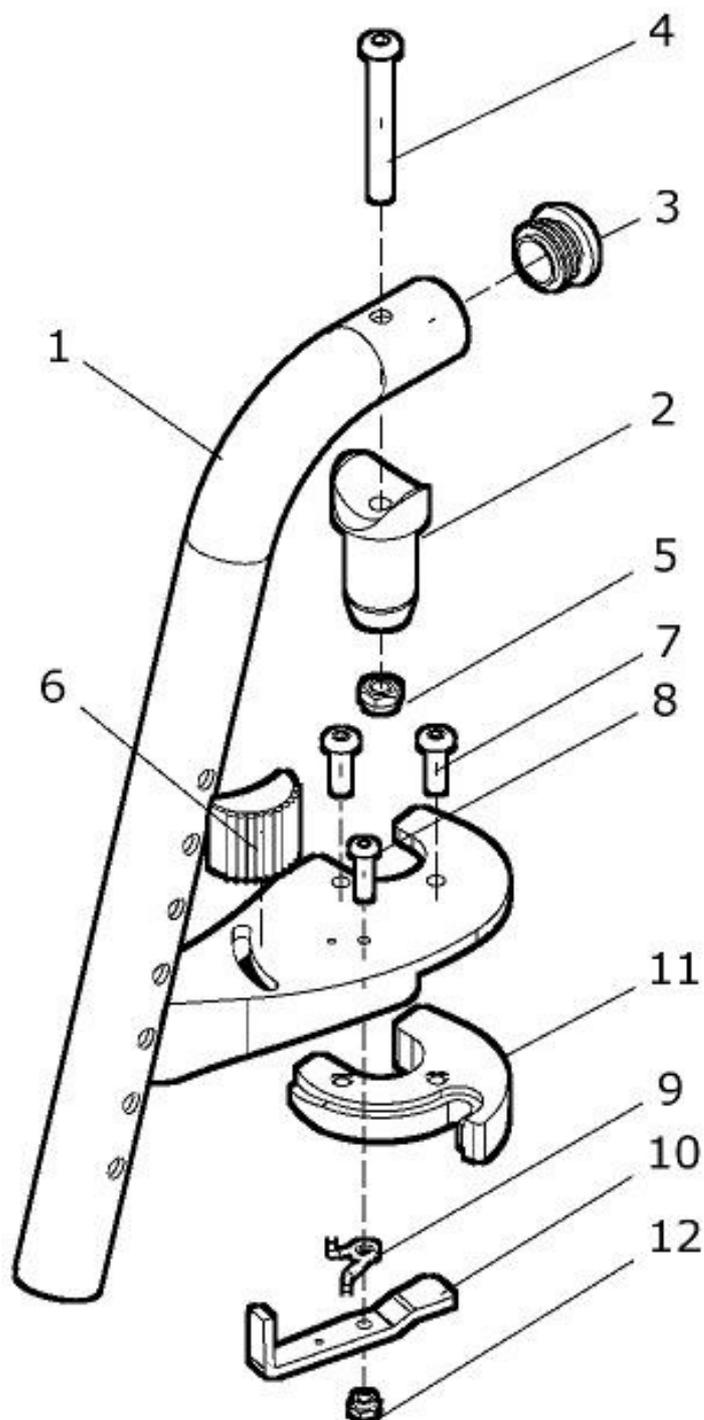

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 9a, 10a - 12	50 512 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts mit Verriegelung und Lagerbolzen kpl. FM: ?	1 St.
1b – 9b, 10b - 12	50 513 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links mit Verriegelung und Lagerbolzen kpl. FM: ?	1 St.
1a	50 512 01	Fußbretthalter rechts FM: ?	1 St.
1b	50 513 01	Fußbretthalter links FM: ?	1 St.
2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 -DIN 985	2 St.
6 – 9a, 10a - 12	50 512 20	Verriegelung rechts kpl.	1 St.
6 – 9b, 10b - 12	50 513 20	Verriegelung links kpl.	1 St.
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.
12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil)

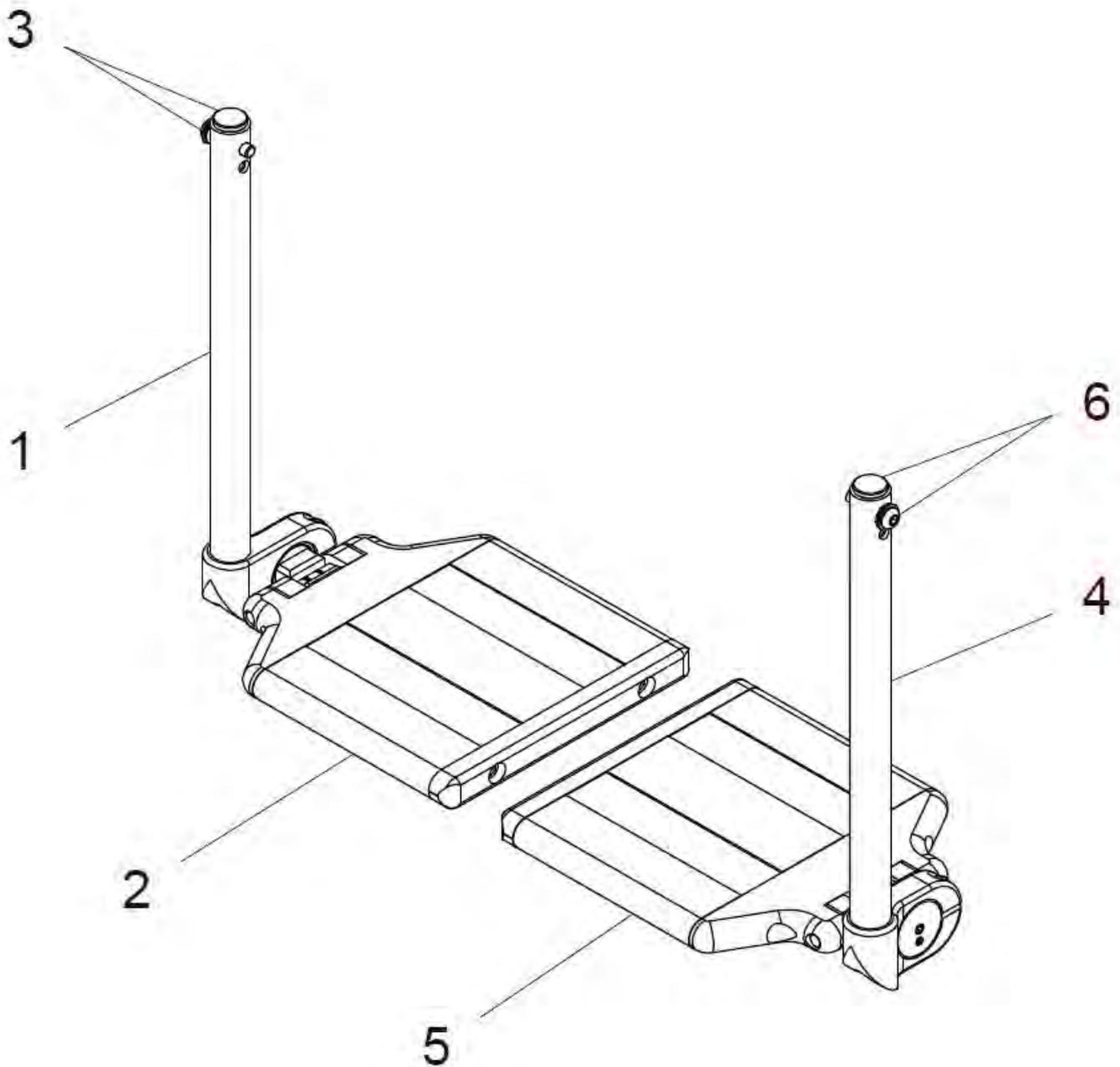

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	22 540 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / gerade kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel Rahmenform gerade FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 6	22 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel Rahmenform Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 3	40 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	1 St.
1a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 – 6	40 540 30	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	1 St.
4a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
4b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
4c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
4d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.

5	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
6	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit FB-Halter (Sprint-Verriegelung)

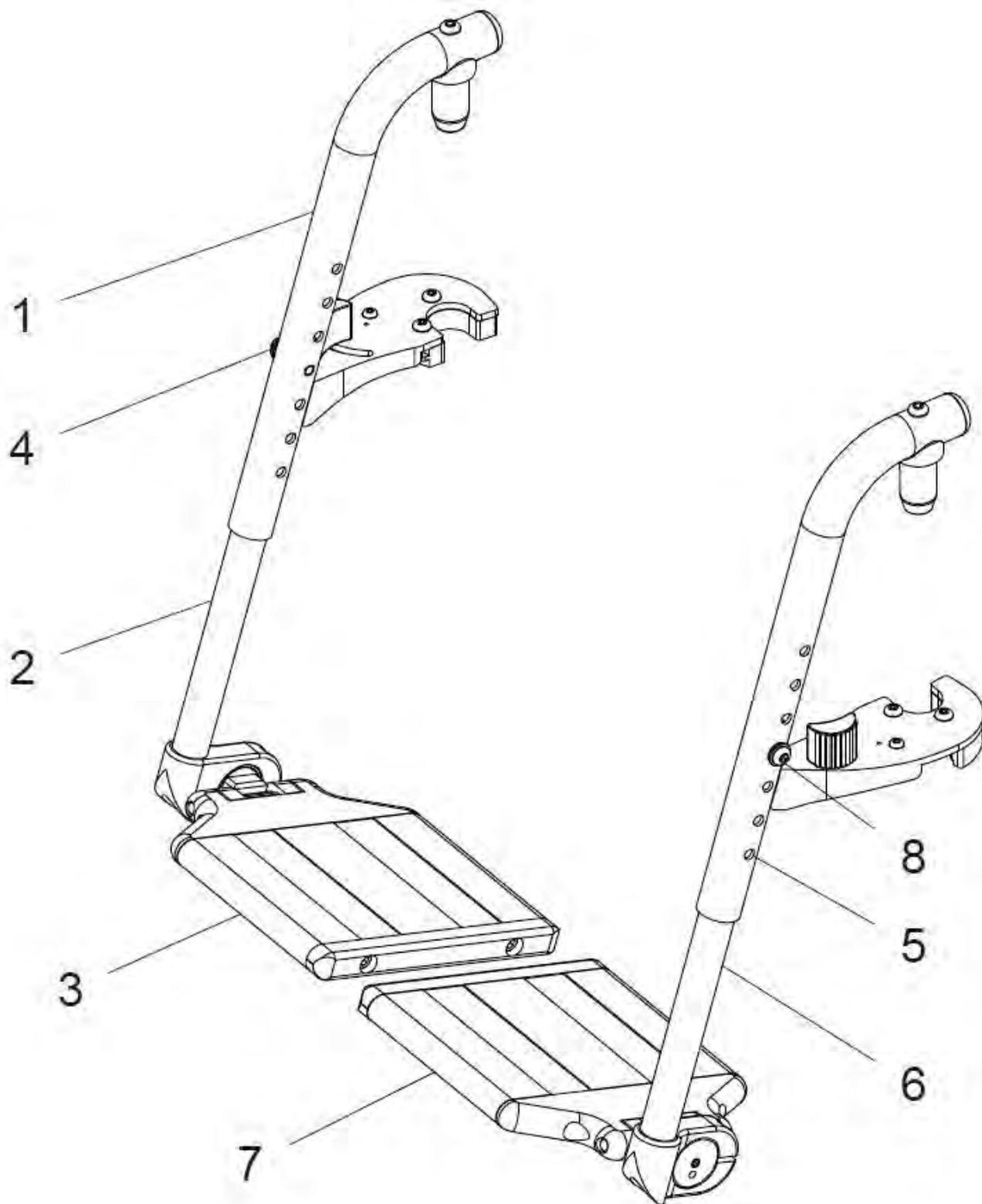

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	50 540 70	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (Paar) kpl. Fußbretthalter mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 4	50 540 72	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (rechts) kpl. Fußbretthalter rechts mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1	50 512 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	1 St.
2 – 4	40 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5 – 8	50 540 73	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbretthalter (links) kpl. Fußbretthalter links mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
5	50 513 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	1 St.

6 – 8	40 540 30	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
6a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
6b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
6c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
6d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
7	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set

Fußbrett (Alu-Profil) geteilt

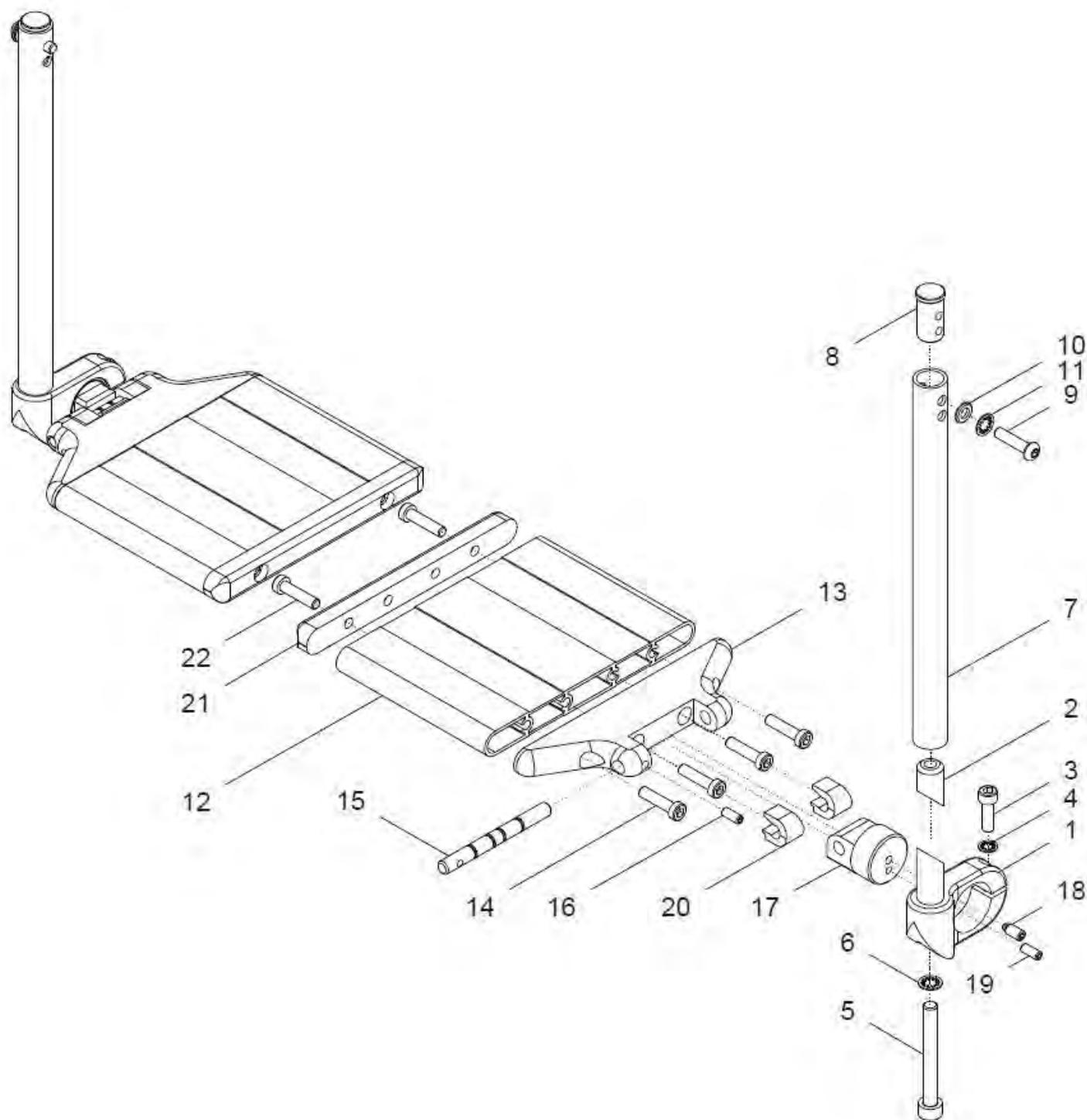


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 540 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / R. gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel für Rahmen gerade FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 22	22 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel für Abduktionsrahmen FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 22	40 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 22	40 540 30	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b - 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b - 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b - 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b - 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a – 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b – 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links	1 St.

1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 22	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12 - 22	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
12b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.

20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung

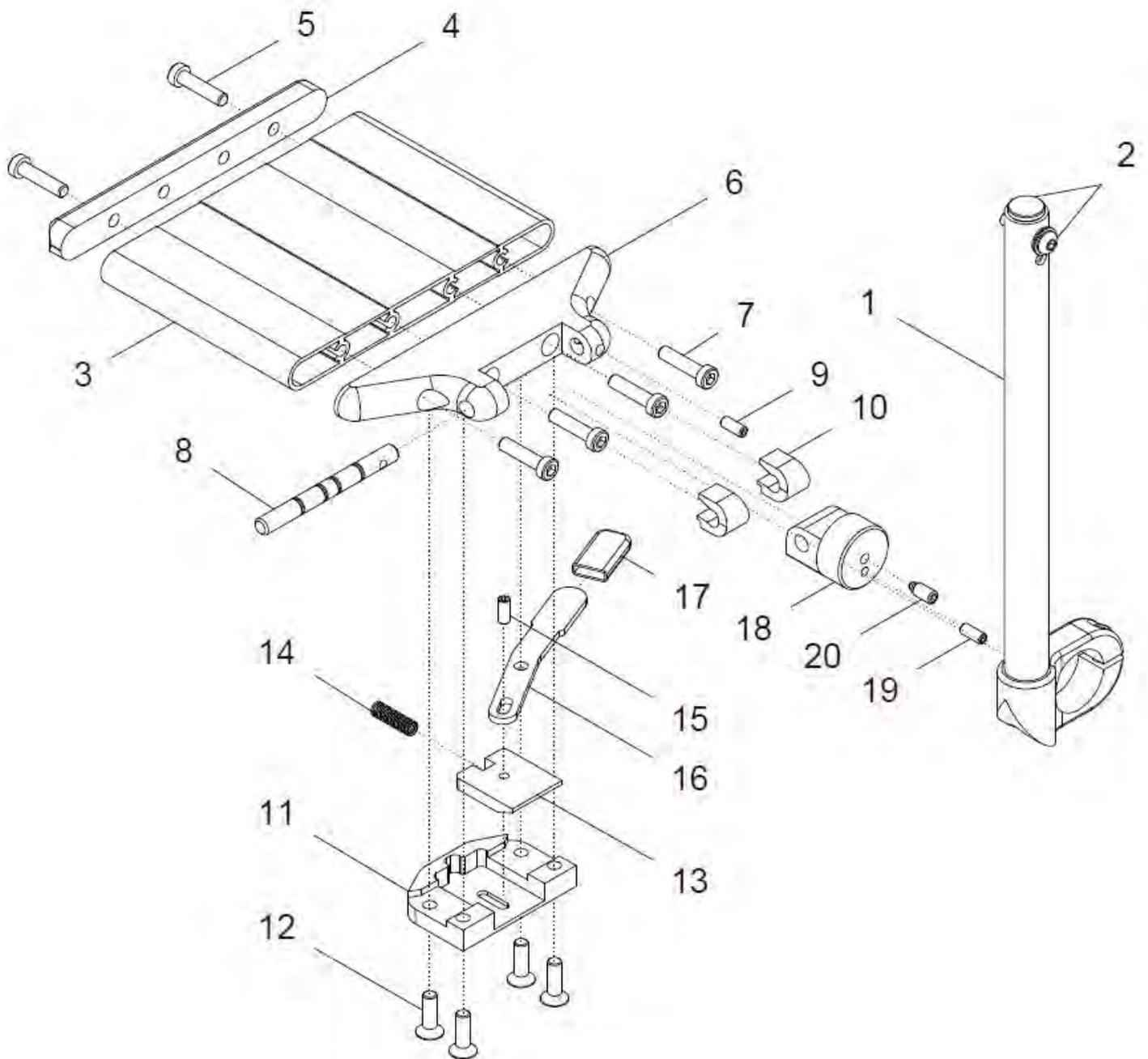

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 550 50	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung kpl. Fußbrett-Profil rechts und links mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1e – 20	40 550 52	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts mit Spastikerverriegelung kpl. Fußbrett-Profil rechts mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 20	40 550 53	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links mit Spastikerverriegelung kpl. Fußbrett-Profil links mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1e	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1f	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1g	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1h	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
3 – 20	40 552 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.

3 – 20	40 552 30	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: schwarz matt feinstruktur Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
3a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
3b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
4	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
5	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
6 – 20	40 551 20	Spastikerverriegelung FB geteilt rechts kpl. (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	1 St.
6 – 20	40 551 30	Spastikerverriegelung FB geteilt links kpl. (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	1 St.
6	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	2 St.
7	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
8	40 521 23	Drehachse	2 St.
9	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
10	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
11 – 17	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	2 St.
11	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	2 St.
12	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	8 St.
13	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	2 St.
14	02 110 05	Druckfeder	2 St.
15	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
16	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	2 St.
17	04 210 82	Flachkappe rot	2 St.
18	40 551 04	Gelenkbolzen FB-Profil geteilt für Spastikerverriegelung	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.


Fußbrett geteilt und FB-Bügel mit Abschwenkmechanismus

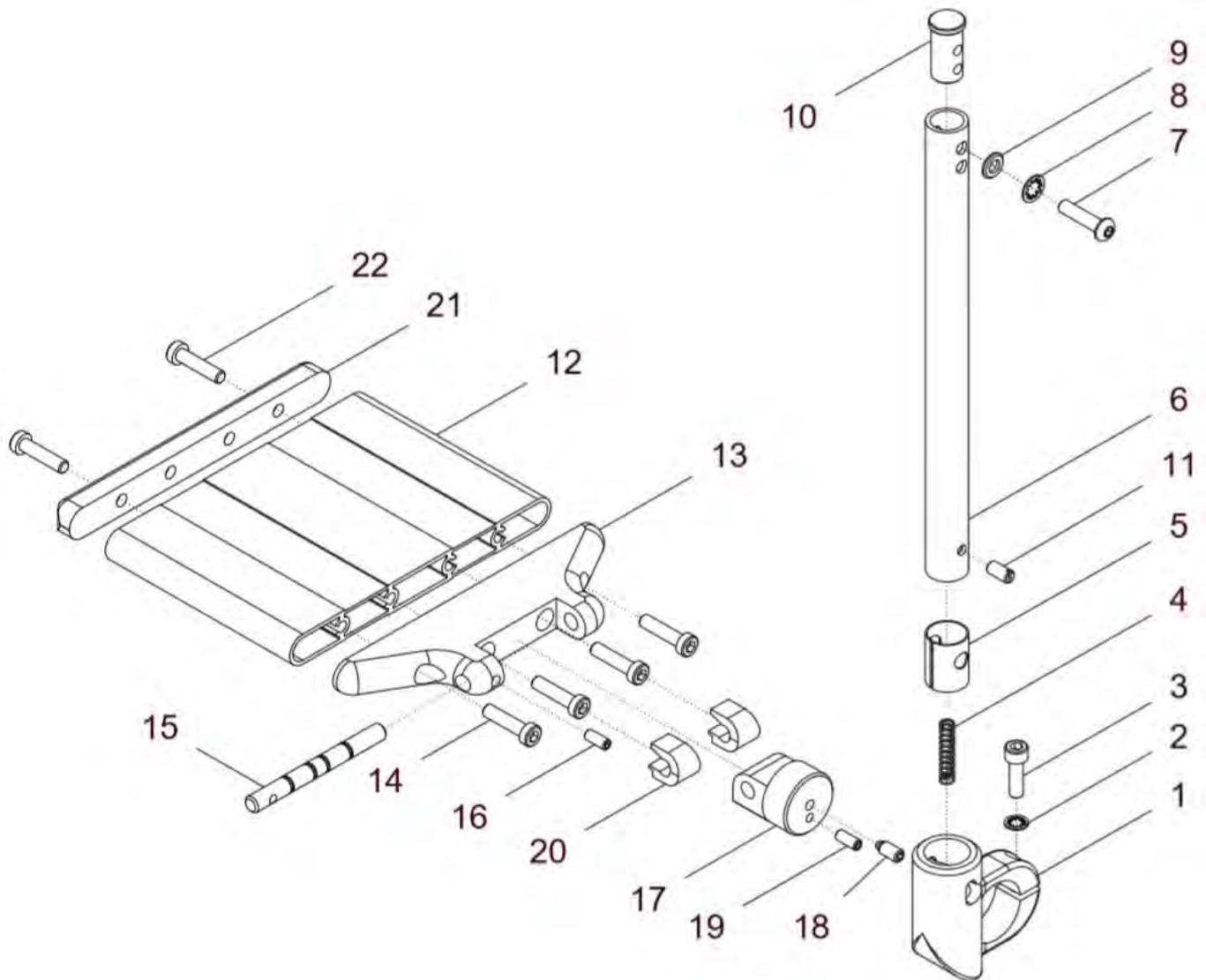

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	40 540 40	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. Paar kpl. FB-Bügel links und rechts mit Abschwenkmechanismus FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1a – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1a – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1b – 11	40 526 70	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1b – 11	40 526 20	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.

12 – 22	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
12 – 22	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
12a	40 541 31	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
12b	40 541 36	Fußbrett (Profil) geteilt für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.


Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil)

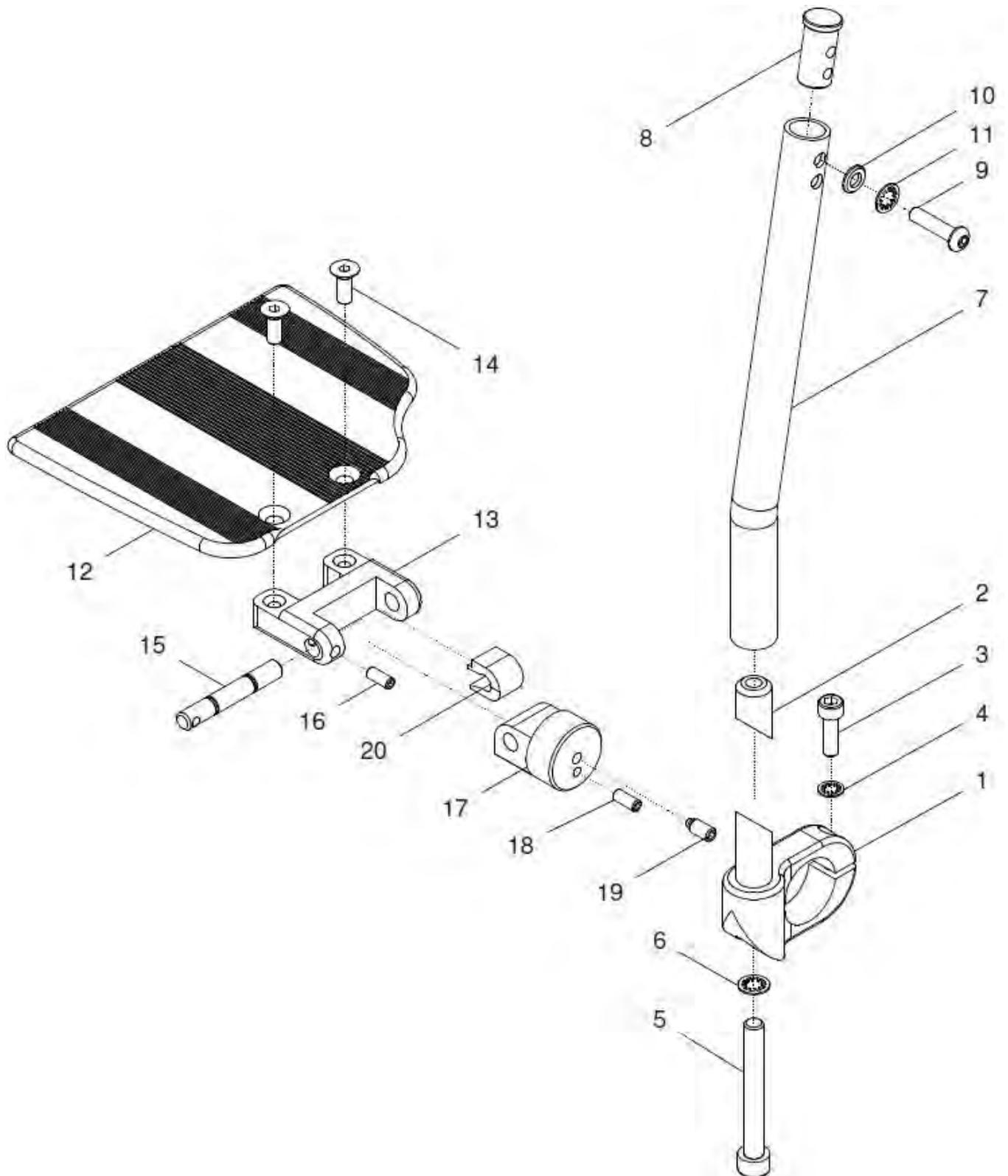

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 572 00	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel Paar kpl. Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel links und rechts FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1a – 20	40 572 30	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel links kpl. Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel links FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1b – 20	40 572 20	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Fußbrettbügel rechts kpl. Fußbrett flach geteilt mit Fußbrettbügel rechts FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b – 6, 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b – 6, 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b – 6, 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b – 6, 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Klemmteil kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.

4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12a - 20	40 572 25	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen rechts kpl. (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b - 20	40 572 35	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) mit Gelenkbolzen links kpl. (ohne FB-Bügel) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12a	40 572 60	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) rechts SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
12b	40 572 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) links SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.


Fußbrett (Alu-Profil) geteilt im Rahmen montiert

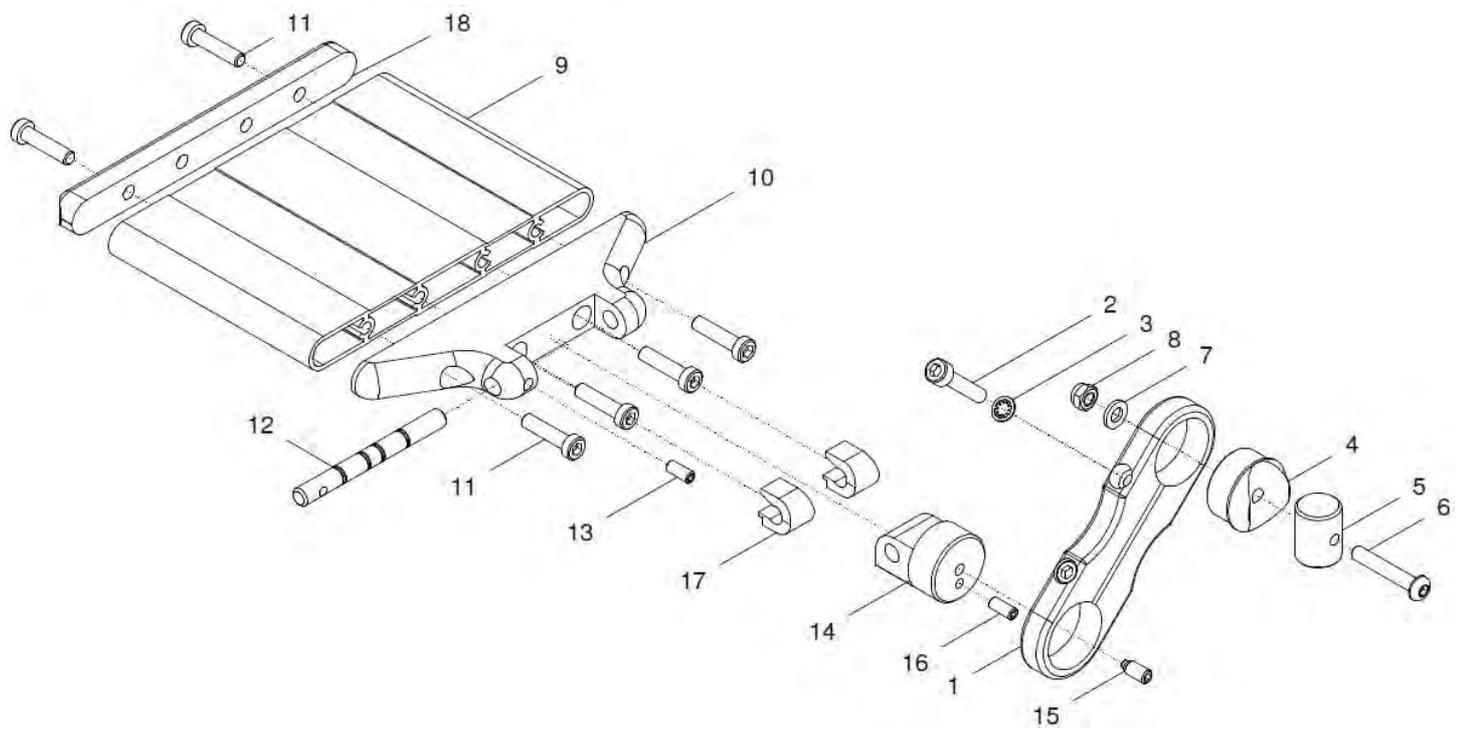

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18	22 550 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) im Rahmen montiert gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 18	22 550 02	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts im Rahmen / gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> für rechte Seite FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	22 550 03	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links im Rahmen / gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> für linke Seite FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	22 550 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) im Rahmen montiert Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 18	22 550 22	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) rechts im Rahmen / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> für rechte Seite FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	22 550 23	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links im Rahmen / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> für linke Seite FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.

2	01 160 75	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 - 18	22 552 00	Fußbrett geteilt (Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen rechts kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9 - 18	22 553 00	Fußbrett geteilt (Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen links kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9a	22 551 31	Fußbrett (Profil) geteilt im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
9b	22 551 36	Fußbrett (Profil) geteilt im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
10 - 18	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	2 St.
10	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	12 St.
12	40 521 23	Drehachse	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
15	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
18	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.


Fußbrett (Alu-Profil) geteilt abgesetzt (mit FB-Bügel und Klemmlaschen)

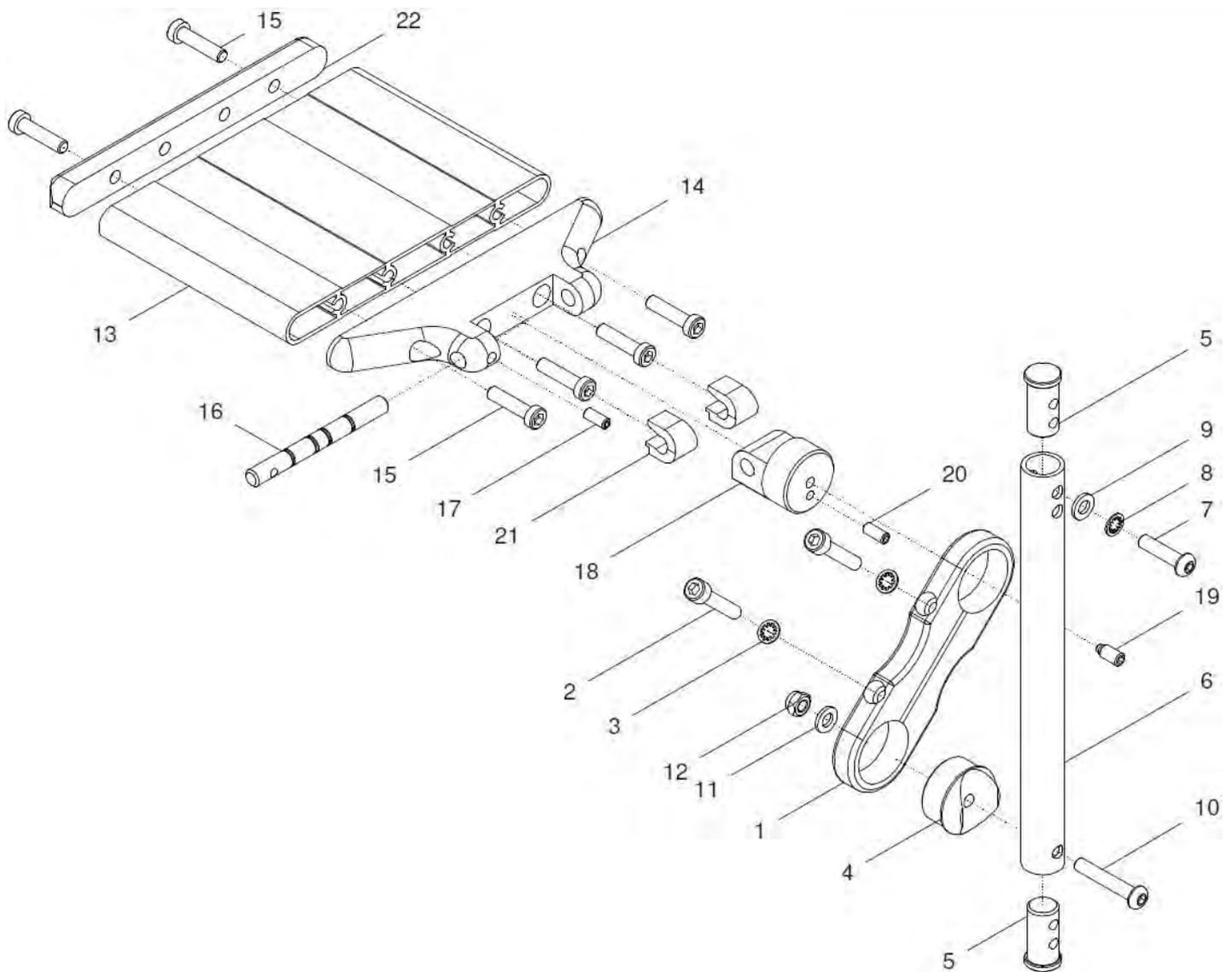

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 530 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) abgesetzt - gerade- kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 Paar
1 – 22	22 530 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) abgesetzt - Abduktion- kpl. Fußbrett-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	1 Paar
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 22	22 552 00	Fußbrett geteilt (Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen rechts kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13 – 22	22 553 00	Fußbrett geteilt (Profil) im Rahmen mit Gelenkbolzen links kpl. FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13a	22 551 31	Fußbrett (Profil) geteilt im Rahmen / Rahmen gerade SB ... SB: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.

13b	22 551 36	Fußbrett (Profil) geteilt im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert) FM: schwarz matt feinstruktur	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 22	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	2 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	12 St.
16	40 521 23	Drehachse	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
20	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
21	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
22	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.


Fußbrett flach geteilt im Rahmen montiert (Flach-Profil)

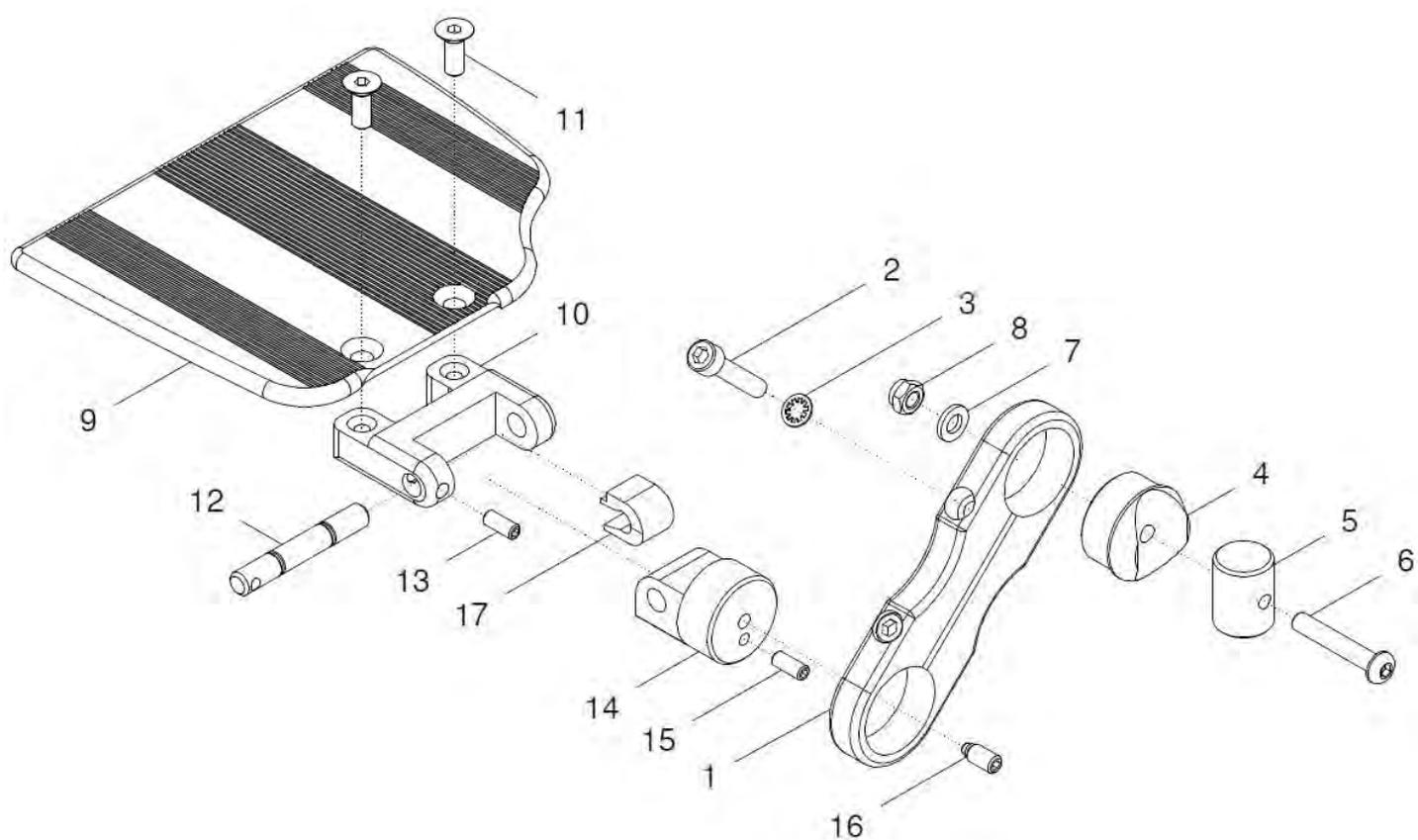

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 550 70	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) im Rahmen gerade kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 17	22 550 75	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) im Rahmen Abduktion kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9a – 17	22 552 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) i. R. u. Gelenkb. rechts kpl. Fußbrett flach geteilt rechts im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.

9b – 17	22 553 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) i. R. u. Gelenkb. links kpl. Fußbrett flach geteilt links im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
9a	22 552 75	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) im Rahmen montiert rechts SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
9b	22 553 75	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) im Rahmen montiert links SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
10	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert	2 St.
11	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
12	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
15	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
16	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.


**Fußbrett flach geteilt abgesetzt (Flach-Profil)
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen)**

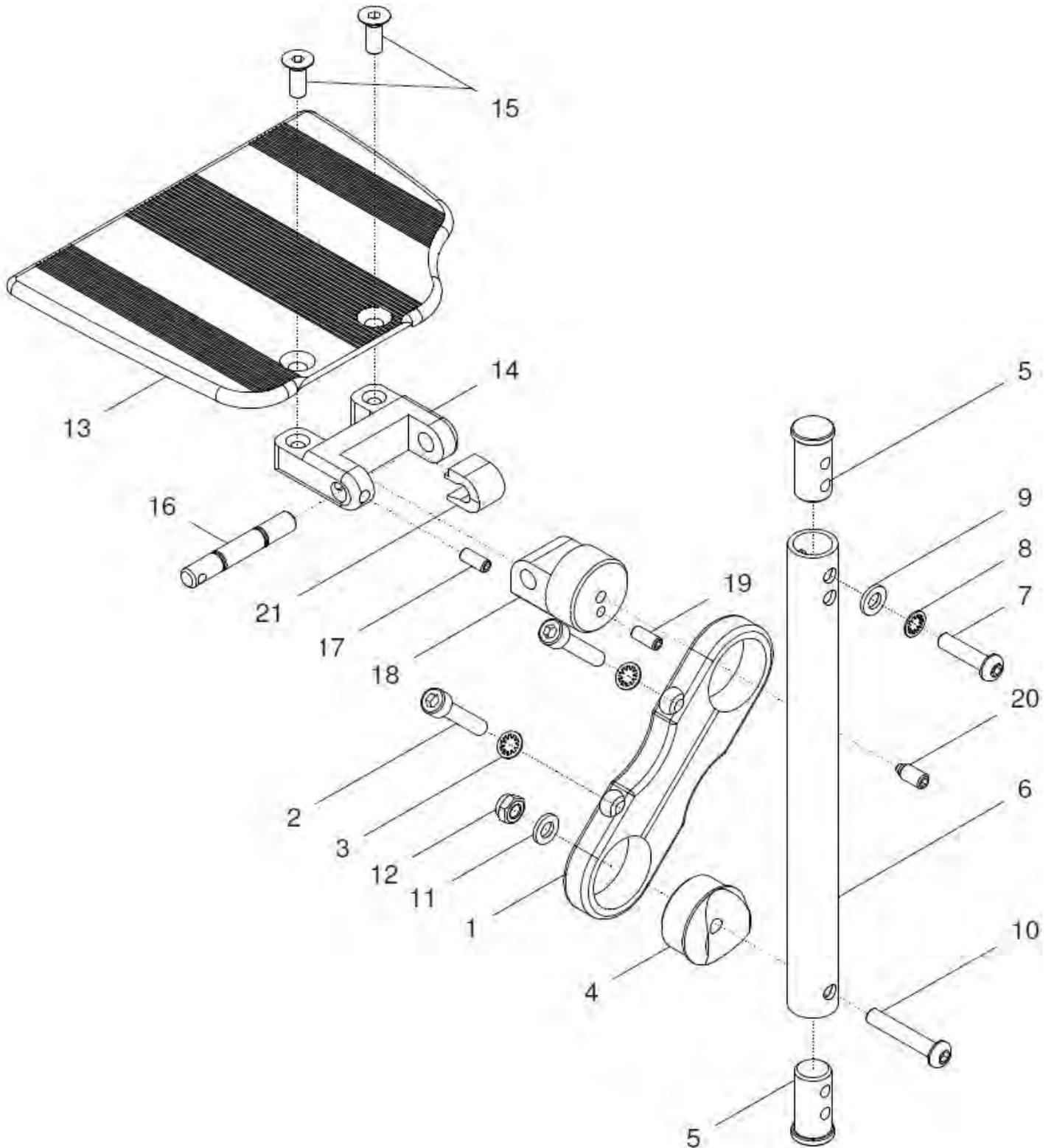

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 530 70	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) abgesetzt - gerade- Fußbrett-Flach-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	kpl. 1 Paar
1 – 21	22 530 75	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) abgesetzt - Abduktion- Fußbrett-Flach-Profil geteilt mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: schwarz matt feinstruktur SB: ?	kpl. 1 Paar
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	kpl. 2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 (ohne Klemmlasche)	kpl. 2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13a – 21	22 552 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) i. R. u. Gelenkb. rechts Fußbrett flach geteilt rechts im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	kpl. 1 St.
13b – 21	22 553 70	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) i. R. u. Gelenkb. links Fußbrett flach geteilt links im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	kpl. 1 St.


13a	22 552 75	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) im Rahmen montiert rechts SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
13b	22 553 75	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) im Rahmen montiert links SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
14	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert	2 St.
15	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
16	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
21	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.

Wadenband

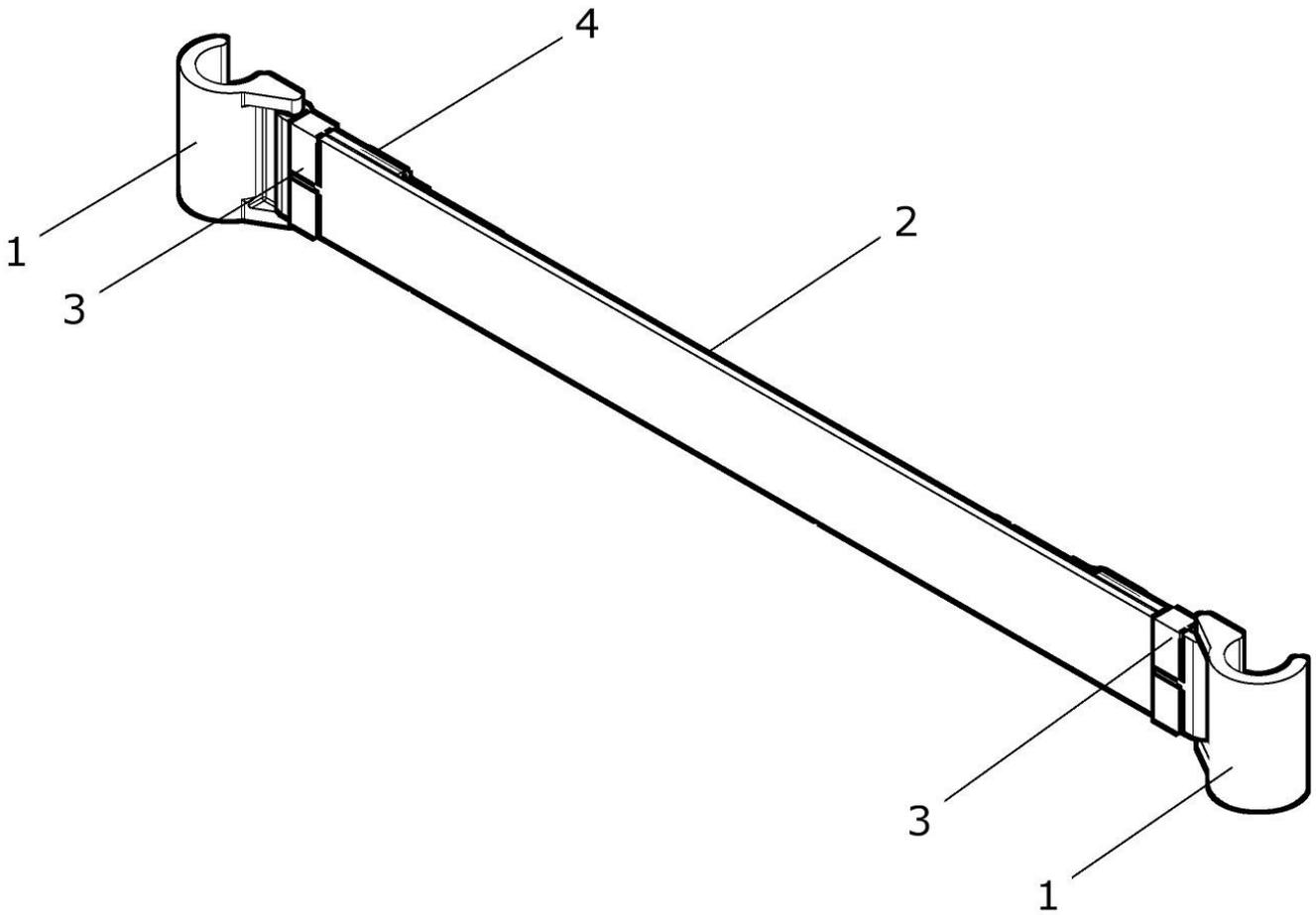

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 519 00	Wadenband mit Flausch und Y-Hook SB ... kpl. mit Wadenbandhalter und Gurtführung SB: ?	1 St.
1	50 519 01	Wadenbandhalter	2 St.
2	40 519 50	Wadenband (Flauschband) SB: ?	1 St.
3	04 220 03	Gurtführung	2 St.
4	04 220 61	Y-Hook	2 St.

**Fußbretthalter hochschwenkbar mit Sprint-Verriegelung
und mit Fußbrett geteilt (Alu-Profil)**

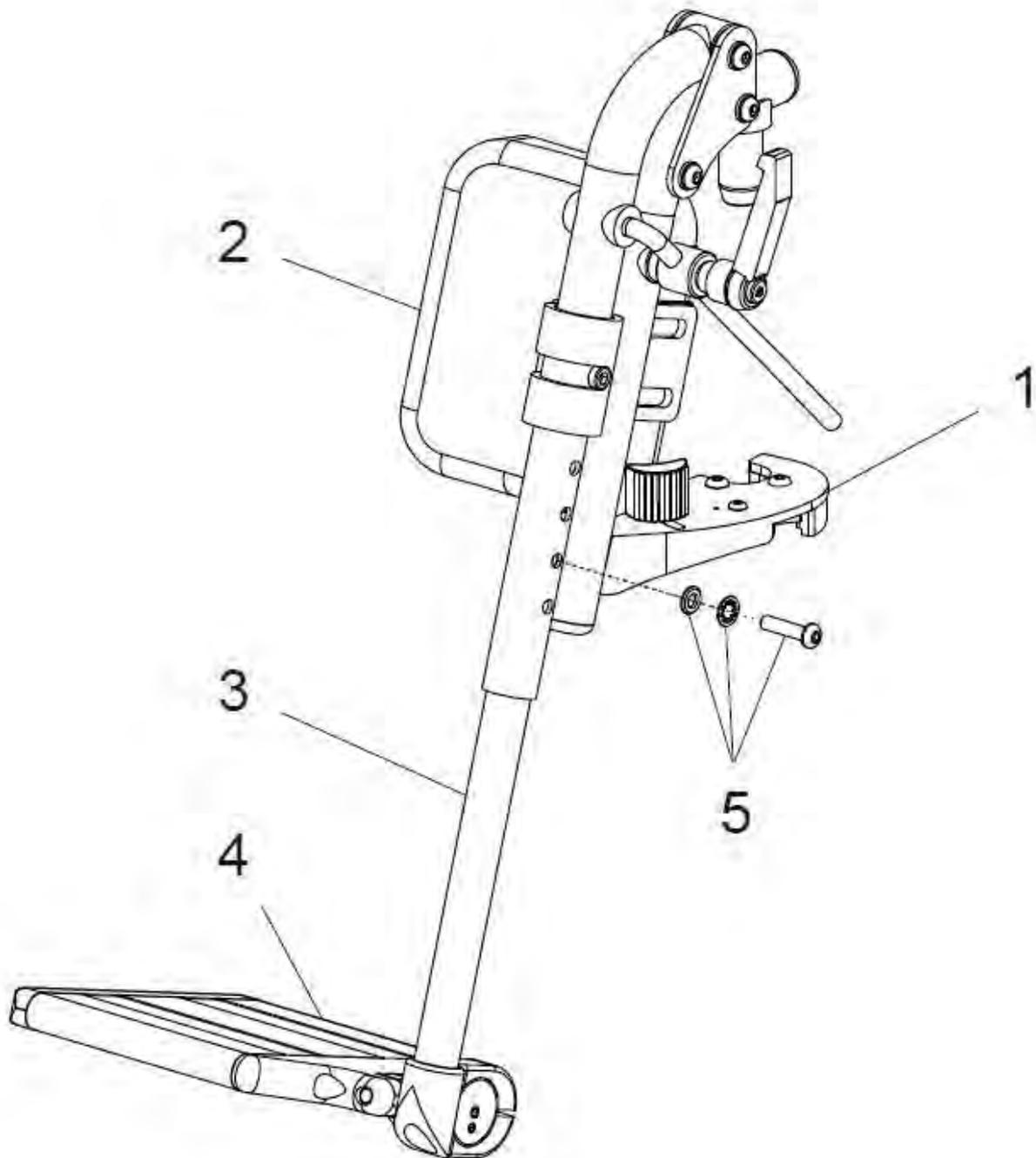


(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	22 570 00	Fußbretthalter hochschwenkbar (Alu-Profil) (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett (Alu-Profil) geteilt und Fußbrettbügel und Wadenposter FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur FM-Halter: ? SB: ? (ab SB 34 bei Rahmen gerade / ab SB 28 bei Abduktion)	1 Paar
1a – 5	22 572 00	Fußbretthalter hochschwenkbar (Alu-Profil) (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett (Alu-Profil) geteilt und Fußbrettbügel und Wadenposter FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur FM-Halter: ? SB: ? (ab SB 34 bei Rahmen gerade / ab SB 28 bei Abduktion)	1 St.
1b – 5	22 573 00	Fußbretthalter hochschwenkbar (Alu-Profil) (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung, mit Fußbrett (Alu-Profil) und Fußbrettbügel und Wadenposter FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur FM-Halter: ? SB: ? (ab SB 34 bei Rahmen gerade / ab SB 28 bei Abduktion)	1 St.
1 – 2	50 570 40	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM-Halter: ? SB: ?	1 Paar
1a – 2	50 572 40	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM-Halter: ? SB: ?	1 St.
1b – 2	50 573 40	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung und mit Wadenposter (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel) FM-Halter: ? SB: ?	1 St.
1a + 1b	50 578 00	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM-Halter: ?	1 Paar
1a	50 578 02	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM-Halter: ?	1 St.
1b	50 578 03	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM-Halter: ?	1 St.

2	91 574 00	Wadenauflage abschwenkbar kpl.	2 St.
3 – 5	22 540 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / gerade kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel Rahmenform gerade FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel gerade: kurz / lang ?	1 Paar
3 – 5	22 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel Rahmenform Abduktion FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Fußbrettbügel gerade: kurz / lang ?	1 Paar
3a/b – 4a, 5	40 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel gerade: kurz / lang ?	1 St.
3a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
3b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
4a	40 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
5	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
3c/d – 4b, 5	40 540 30	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel (links) kpl. Fußbrett-Profil mit Fußbrettbügel FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel gerade: kurz / lang ?	1 St.
3c	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
3d	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
4b	40 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM-Fußbrett: schwarz matt feinstruktur SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.

Fußbretthalter hochschwenkbar mit Sprint-Verriegelung
(ohne Wadenpolster / ohne Fußbrett)

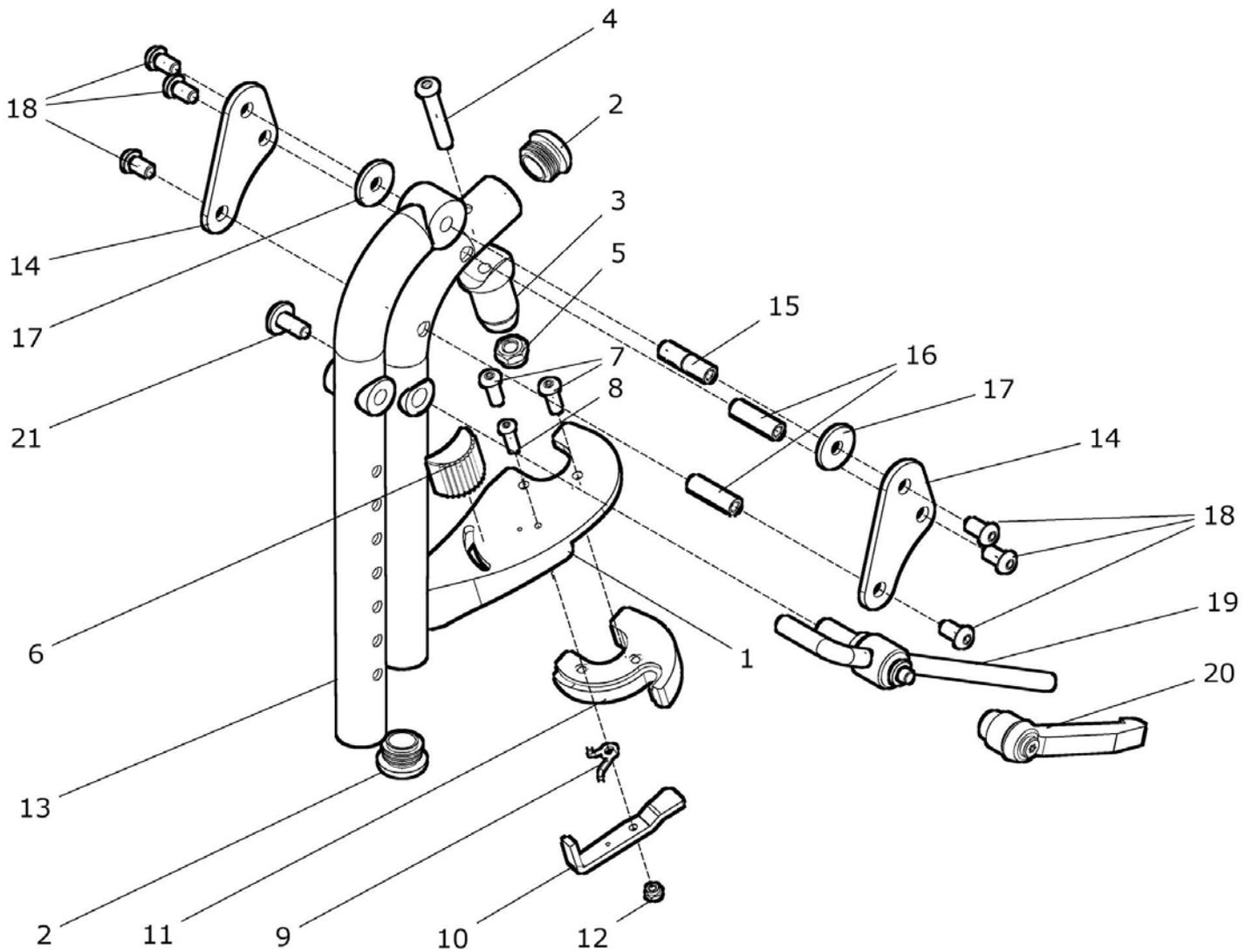


(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	50 578 00	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (Paar) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 Paar
1a - 21	50 578 02	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (rechts) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung rechts (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1b - 21	50 578 03	Fußbretthalter hochschwenkbar, ohne FB / Wp (links) kpl. FB-Halter mit SPRINT-Verriegelung links (ohne Fußbrett / ohne Fußbrettbügel / ohne Wadenpolster) FM: ?	1 St.
1a	50 578 21	Fußbretthalter SPRINT rechts -Grundstütze- FM: ?	1 St.
1b	50 578 31	Fußbretthalter SPRINT links -Grundstütze- FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
3	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 - DIN 985	2 St.
6 - 9a, 10a - 12	50 512 20	Verriegelung rechts kpl.	1 St.
6 - 9b, 10b - 12	50 513 20	Verriegelung links kpl.	1 St.
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.
12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.
13	91 571 51	Fußbretthalter hochschwenkbar Oberrohr rechts / links FM: ?	2 St.
14	91 571 02	Lagerplatte Ø8 schwarz	4 St.
15	91 571 04	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 30mm mit Rille	2 St.
16	91 571 03	Distanzbuchse Ø8 / M6 / 28mm	4 St.
17	01 321 03	Scheibe 8,4 - DIN 9021	4 St.
18	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	12 St.

19a	91 571 20	Stützstange rechts für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
19b	91 571 30	Stützstange links für Fußbretthalter hochschwenkbar kpl.	1 St.
20	01 190 52	Klemmhebel Mutter/verst. M6	2 St.
21	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	2 St.

Wadenpolster abschwenkbar

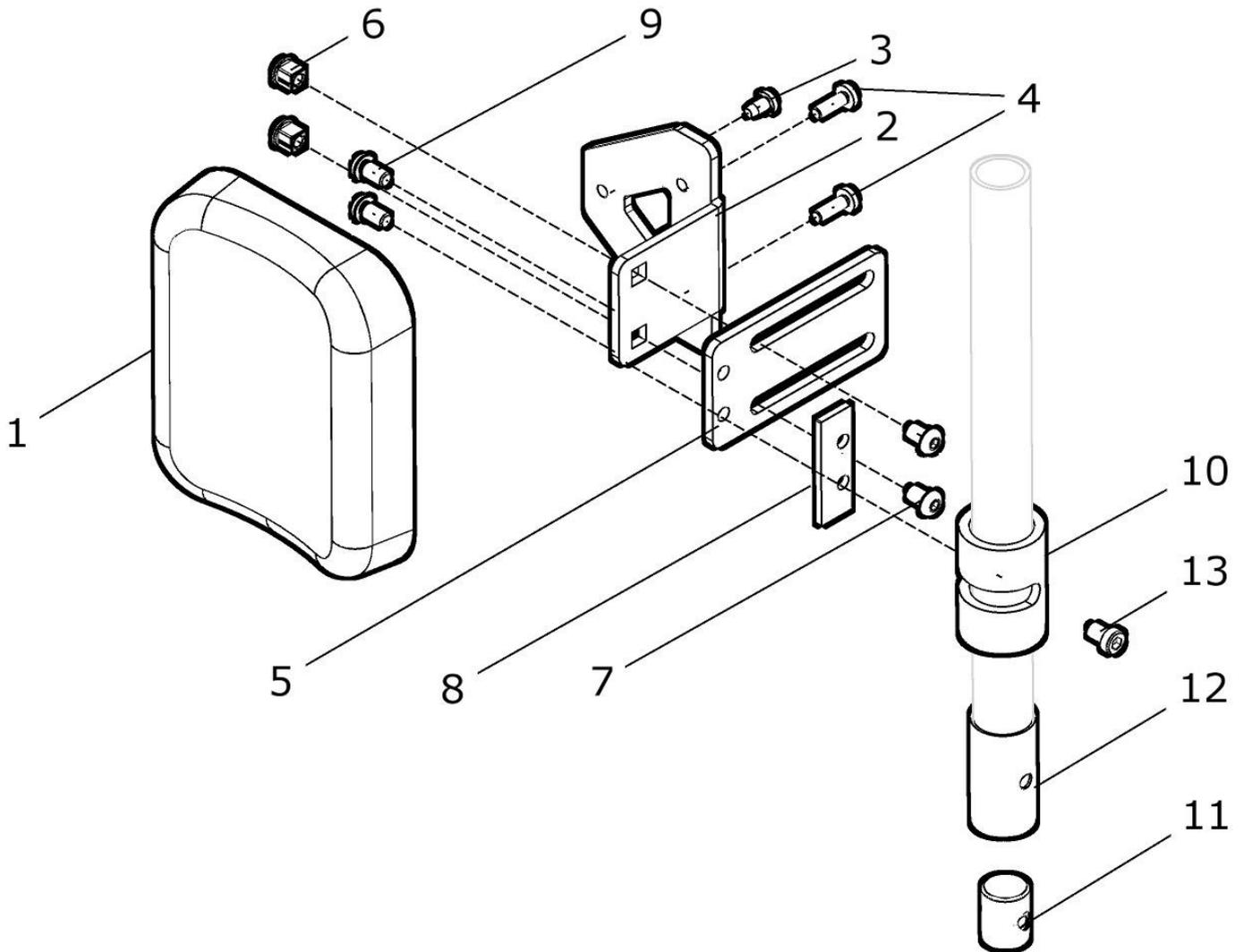


(ab Baujahr 03 / 2016 - Stützstange außen montiert)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	91 574 00	Wadenauflage abschwenkbar kpl. mit Schwenkadapter (rechts und links verwendbar) SB: ?	2 St.
1 – 4	91 574 10	Wadenpolster mit Wadenauflage (rechts und links verwendbar) SB: ?	2 St.
1a	04 101 01	Wadenpolster groß (ab SB 40cm)	2 St.
1b	04 101 02	Wadenpolster klein (SB 28 – 38cm)	2 St.
2 – 13	91 574 15	Wadenauflage abschwenkbar (ohne Wadenpolster) kpl. mit Schwenkadapter (rechts und links verwendbar)	2 St.
2	91 574 01	Wadenauflage	2 St.
3	01 511 21	Plastofast-Schraube M5x16 - W1412	2 St.
4	01 156 56	Linsenkopfschraube M5x16 - ISO 7380F schwarz	4 St.
5	91 574 02	Verstellplatte für Wadenauflage	2 St.
6	G20 451 21	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
7	01 156 63	Linsenkopfschraube M6x10 - ISO 7380F schwarz	4 St.
8	91 574 03	Unterlegplatte für Schwenkadapter	2 St.
9	01 156 64	Linsenkopfschraube M6x12 - ISO 7380F schwarz	4 St.
10	50 571 07	Schwenkadapter für Wadenpolster abschwenkbar	2 St.
12	50 571 08	Buchse	2 St.
11	50 571 09	Klemmbuchse	2 St.
13	01 161 22	Zylinderkopfschraube M6x10 - DIN 6912	2 St.

Räder


Gruppe 6

Lochplatte standard (innen montiert)

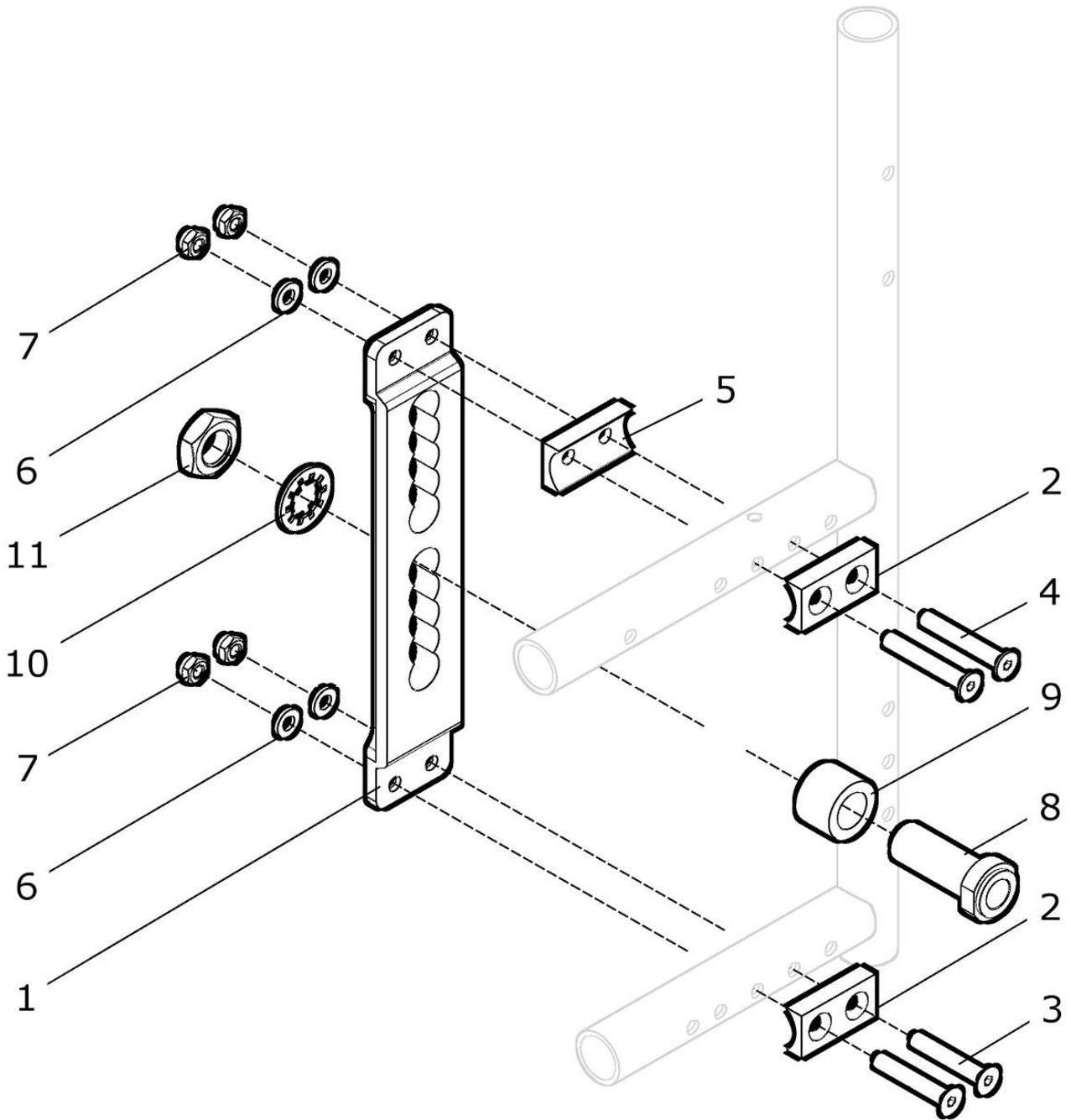

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 621 00	Lochplatte innen montiert Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 2°	kpl. 2 St.
1	50 621 01	Lochplatte standard	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
8 – 11	50 622 40	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 18mm Buchse kpl.	2 St.
8	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
9	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Lochplatte standard (außen montiert)

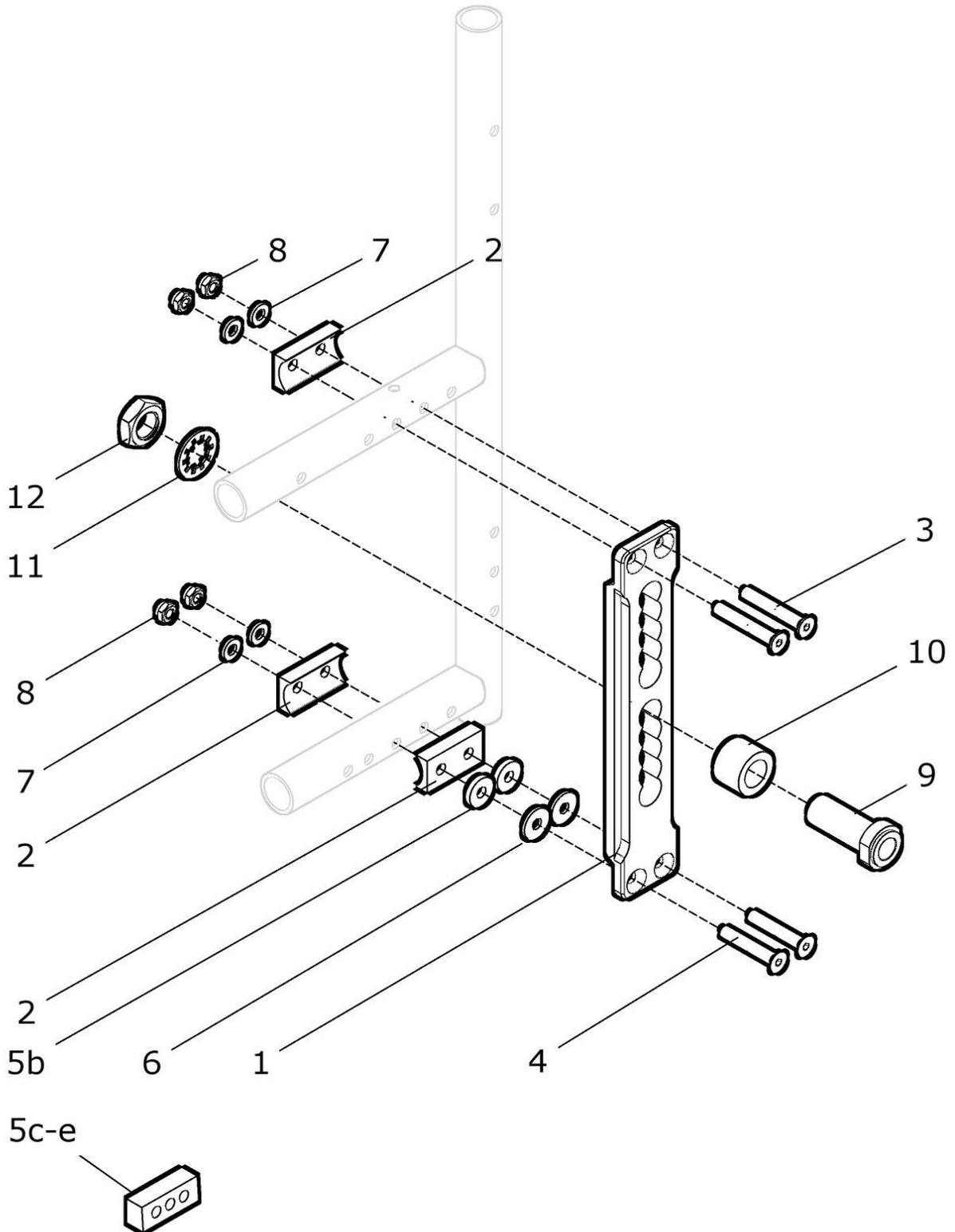


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	50 621 10	Lochplatte außen montiert Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben Sturz: ?	kpl. 2 St.
1	50 621 01	Lochplatte standard	2 St.
2 – 4a, 7 - 8	50 621 90	Montageset Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a - 8	50 621 92	Montageset Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset Sturz 7°	2 St.
2 – 4e, 5d, 7, 8	50 621 99	Montageset Sturz 10°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5	6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4a	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 0° 4 St.
4b	01 120 18	Senkschraube M6x50 - DIN 7991	Sturz 2° 4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4° 4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7° 4 St.
4e	01 120 24	Senkschraube M6x80 - DIN 7991	Sturz 10° 4 St.
zu 5	-----	ohne Scheibe	Sturz 0° -
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2° 4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4° 2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7° 2 St.
5d	50 621 08	Distanzblock 33mm	Sturz 10° 2 St.
zu 6	-----	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°, 10° -
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2° 4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
9 – 12	50 622 20	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 6mm Buchse	kpl. 2 St.
9	01 195 01	Einschraubadapter 12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
10	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
11	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM16 ZN	2 St.
12	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Alternative Buchsen:

10b	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10c	50 622 21	Distanzring (Buchse) 15mm (z.B. bei RACY-Seitenteil mit 2° Sturz)	2 St.

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe schwarz)

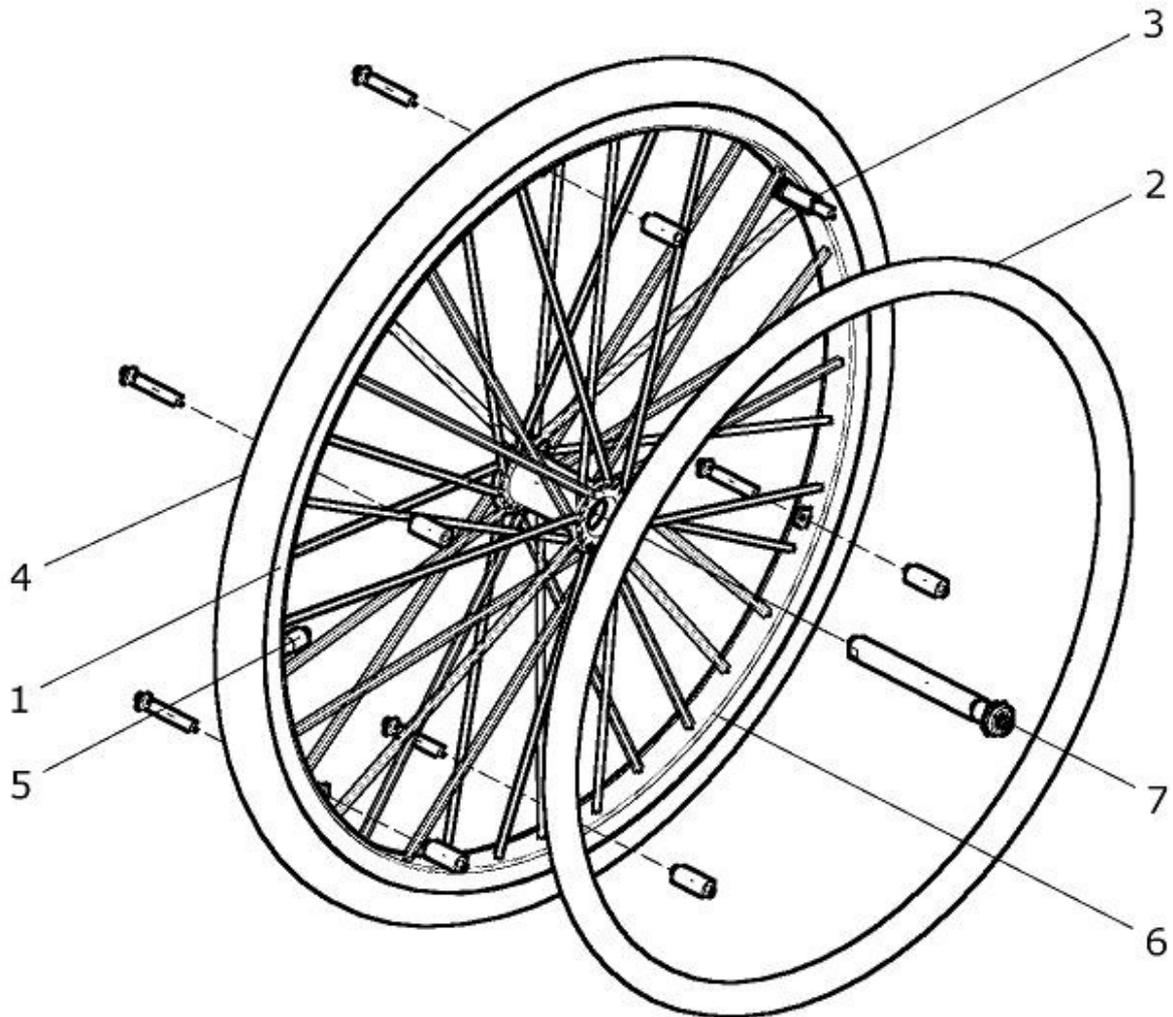

Antriebsrad Standard 24 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 620 81	Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 84	Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 80	Antriebsrad 24“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 82	Antriebsrad 24“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 83	Antriebsrad 24“x1 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 85	Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 86	Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 87	Antriebsrad 24“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	50 620 88	Antriebsrad 24“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	50 620 15	Antriebsrad 24“x1 Luftbereifung feinprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b, 5b – 6	50 620 10	Antriebsrad 24“x1 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	50 620 00	Antriebsrad 24“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4h, 6	50 620 20	Antriebsrad 24"x1 Pannensicher grau (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g, 6	50 620 22	Antriebsrad 24"x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 626 00	Speichenrad 24" (gekreuzt gespeicht und schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	Greifring 24" Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	50 623 85	Greifring 24" Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	50 623 00	Greifring 24" Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	50 623 30	Greifring 24" Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	50 623 50	Greifring 24" Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3c	50 623 58	Greifring 24" Aluminium schwarz / Anbau super eng kpl.	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24" Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24" Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24" Aluminium silber eloxiert	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 59	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x25 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24" x 1" grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24" x 1" DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24" x 1" pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Standard 22 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	10 610 86	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 89	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 85	Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofi kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 87	Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 88	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 82	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 83	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 81	Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 84	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 80	Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	10 610 10	Antriebsrad 22“x1 Luftbereifung feinprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	10 610 00	Antriebsrad 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4e, 6	10 610 20	Antriebsrad 22“x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.

1	10 616 00	Speichenrad 22" (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2") (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	10 613 85	Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	10 613 00	Greifring 22" Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	10 613 30	Greifring 22" Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	10 613 50	Greifring 22" Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a	10 613 56	Greifring 22" Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22" Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22" Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 122 41	Laufdecke 22" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22" x 1" grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22" x 1" pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22" CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 24" CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22" TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Standard 20 Zoll (Alu-Nabe schwarz)


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1, 2a – 4b, 5b - 6	30 630 82	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4c, 5b – 6	30 630 83	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftber. SENTINEL schwarz kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 SENTINEL schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4a, 5a – 6	30 630 85	Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4d, 6	30 630 86	Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4e, 6	30 630 87	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4f, 6	30 630 88	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher schwarz kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	30 630 05	Antriebsrad 20“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4c	30 630 06	Antriebsrad 20“x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1, 2a, 3a	30 630 90	Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz eng /ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2a, 3b	30 630 91	Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz weit /ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3a	30 630 92	Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl eng / ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3b	30 630 93	Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl weit / ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.
1	30 631 05	Speichenrad 20“ (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2“) (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.

2a – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng	kpl.	1 St.
2a – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit	kpl.	1 St.
2b – 3a	30 633 15	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau eng	kpl.	1 St.
2b – 3b	30 633 30	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau weit	kpl.	1 St.
2a	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz	(mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20“ Edelstahl	(mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng	kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit	kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20“ x 1 3/8“	grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20“ x 1“	feinprofil	1 St.
4c	05 120 45	Laufdecke 20“ x 1“	SENTINEL (schwarze Decke)	1 St.
4d	05 120 51	Bereifung 20“ x 1 3/8	pannensicher grau	1 St.
4e	05 120 52	Bereifung 20“ x 1	pannensicher grau	1 St.
4f	05 120 53	Bereifung 20“ x 1	pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20“ x 1 3/8“		1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20“ x 1“		1 St.
6	05 122 03	Felgenband		1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor		2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“)	L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	30 633 65	Greifring 20“ Maxgrepp ERGO PARA	kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20“ Maxgrepp ERGO PARA CP	kpl.	1 St.

Design-Antriebsrad 24" (gerade gespeicht / Alu-Nabe silber)

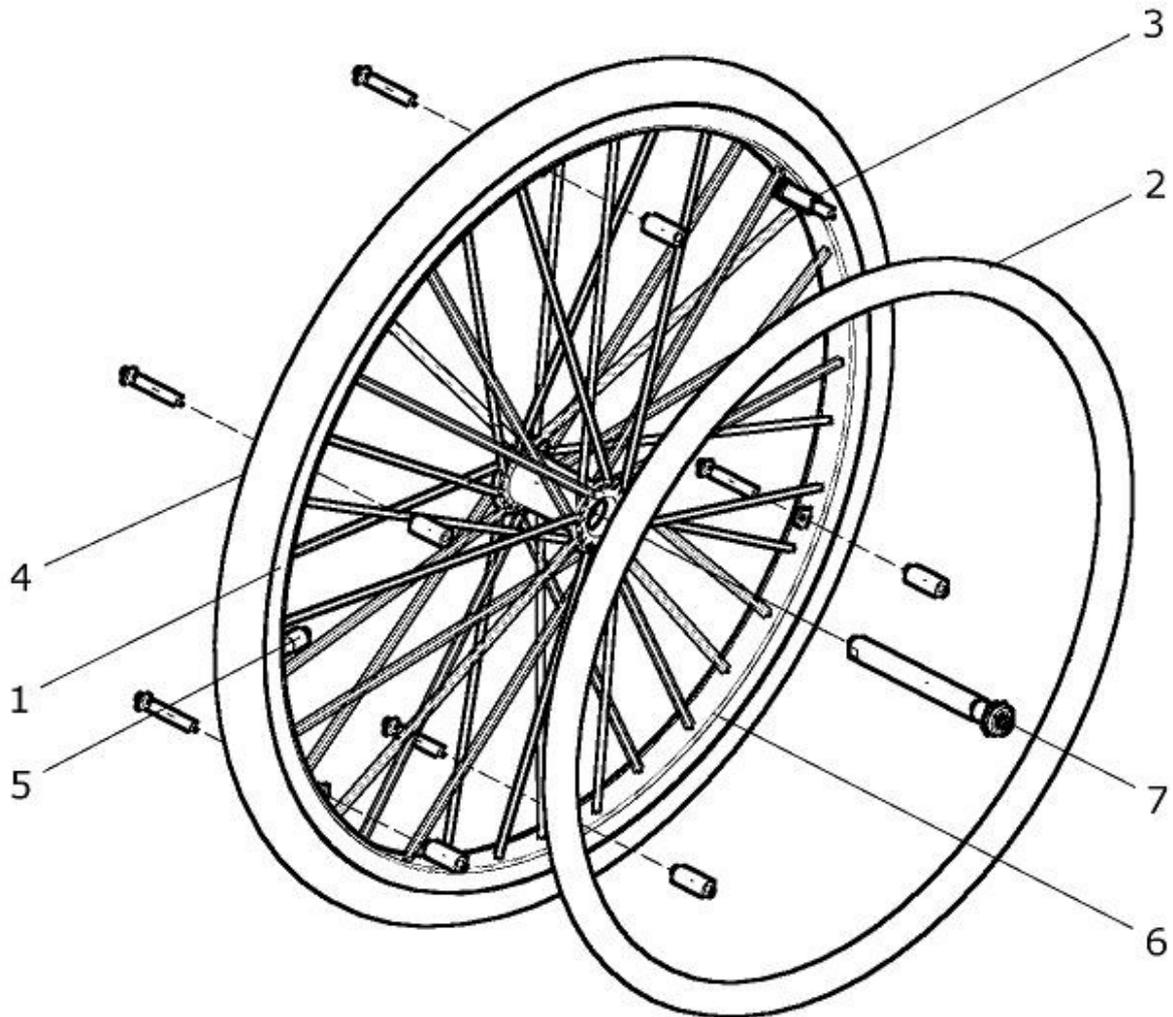

Design-Antriebsrad 24 Zoll (Alu-Nabe silber)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	45 620 81	Antriebsrad Design 24“x1 Edelstahl / Luft. feinprofil kpl. mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 82	Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Luft. feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 88	Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 89	Antriebsrad Design 24“x1 Alu. schwarz / Pannen. schwarz kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	45 620 90	Antriebsrad Design 24“x1 Edelstahl / Pannen. schwarz kpl. mit Edeltstahl-Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	45 620 15	Antriebsrad Design 24“x1 Luftbereifung feinprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4h, 6	45 620 20	Antriebsrad Design 24“x1 Pannensicher grau (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 626 00	Speichenrad Design 24“ (gerade gespeicht und Nabe ½“ silber) (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	50 623 85	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	50 623 00	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	50 623 30	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	50 623 50	Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3c	50 623 58	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau super eng kpl.	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber eloxiert	1 St.

3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
3c	50 623 59	Sonder-Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x35 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 Set
4a	05 124 41	Laufdecke 24" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24" x 1" grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24" x 1" DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24" x 1" pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
7	45 626 21	Steckachse Ø12,7mm (1/2") L=99 mm Kappe silber / Logo schwarz	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 - 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)



Antriebsrad SAFETY-GRIP 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	40 622 80	Antriebsrad SAFETY-GRIP 24"x1 3/8 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24"x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	40 622 81	Antriebsrad SAFETY-GRIP 24"x1 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24"x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	40 622 82	Antriebsrad SAFETY-GRIP 24"x1 Luft. feinprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	40 622 83	Antriebsrad SAFETY-GRIP 24"x1 pannensicher grau kpl. Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24"x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 24" (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24" x 1" grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24" x 1" DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24" x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24" x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24" x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24" x 1 3/8"	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 622 80	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 81	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 82	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 83	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 pannensicher grau kpl. Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad TENSIO (mit 18 FIBRE Speichen)



Antriebsrad TENSIO 24 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	45 614 81	Antriebsrad TENSIO 24"x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 2	45 614 41	Antriebsrad TENSIO 24" mit Alu-Greifring schwarz (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 614 91	Speichenrad TENSIO 24" schwarz (mit Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 614 11	Greifring TENSIO 24" Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad TENSIO 22 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	45 612 81	Antriebsrad TENSIO 22"x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 2	45 612 41	Antriebsrad TENSIO 22" mit Alu-Greifring schwarz (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 612 91	Speichenrad TENSIO 22" schwarz (mit Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 612 11	Greifring TENSIO 22" Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad LWW (Lightweightwheels)




Antriebsrad LWW 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	40 614 81	Antriebsrad LWW 24"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	40 614 85	Antriebsrad LWW 24"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 24"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 614 89	Speichenrad LWW 24" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	40 613 10	Greifring LWW 24" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	40 613 15	Greifring LWW 24" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	40 613 84	Greifring CURVE L 24" / Lasche für LWW 24" Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 124 43	Laufdecke 24" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 124 49	Laufdecke 24" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 124 22	Schlauch 24" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad LWW 22 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	22 614 81	Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	22 614 85	Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 614 89	Speichenrad LWW 22" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	22 613 10	Greifring LWW 22" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	22 613 15	Greifring LWW 22" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	22 613 84	Greifring CURVE 22" / Lasche für LWW 22" Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 21" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 121 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.

Lochplatte Trommelbremse (innen montiert)

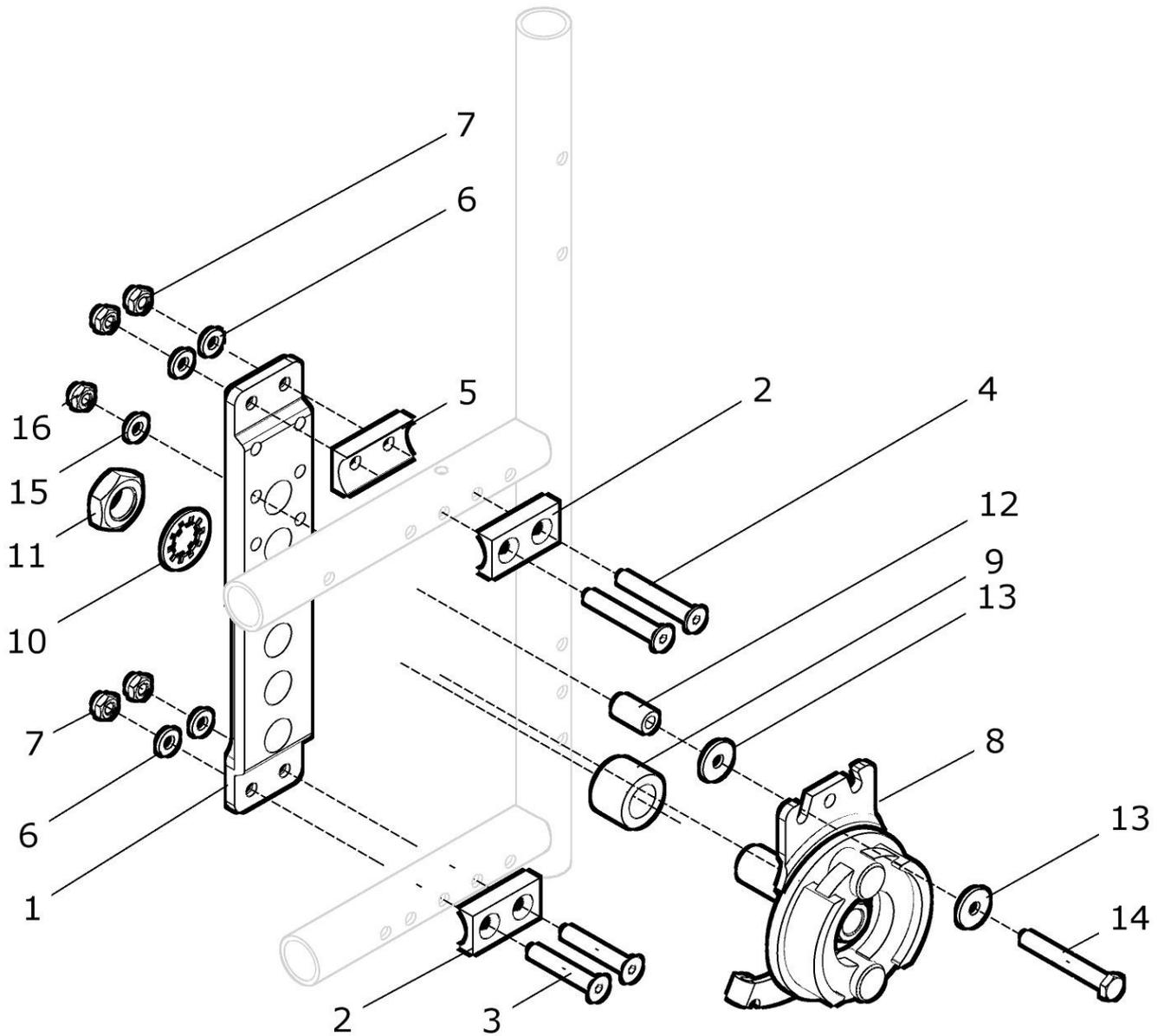

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 00	Lochplatte für Trommelbremse innen montiert kpl. Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 2°	2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)	1 St.
9	50 661 12	Distanzscheibe 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW24	2 St.
12	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
14	01 110 08	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte Trommelbremse (außen montiert)

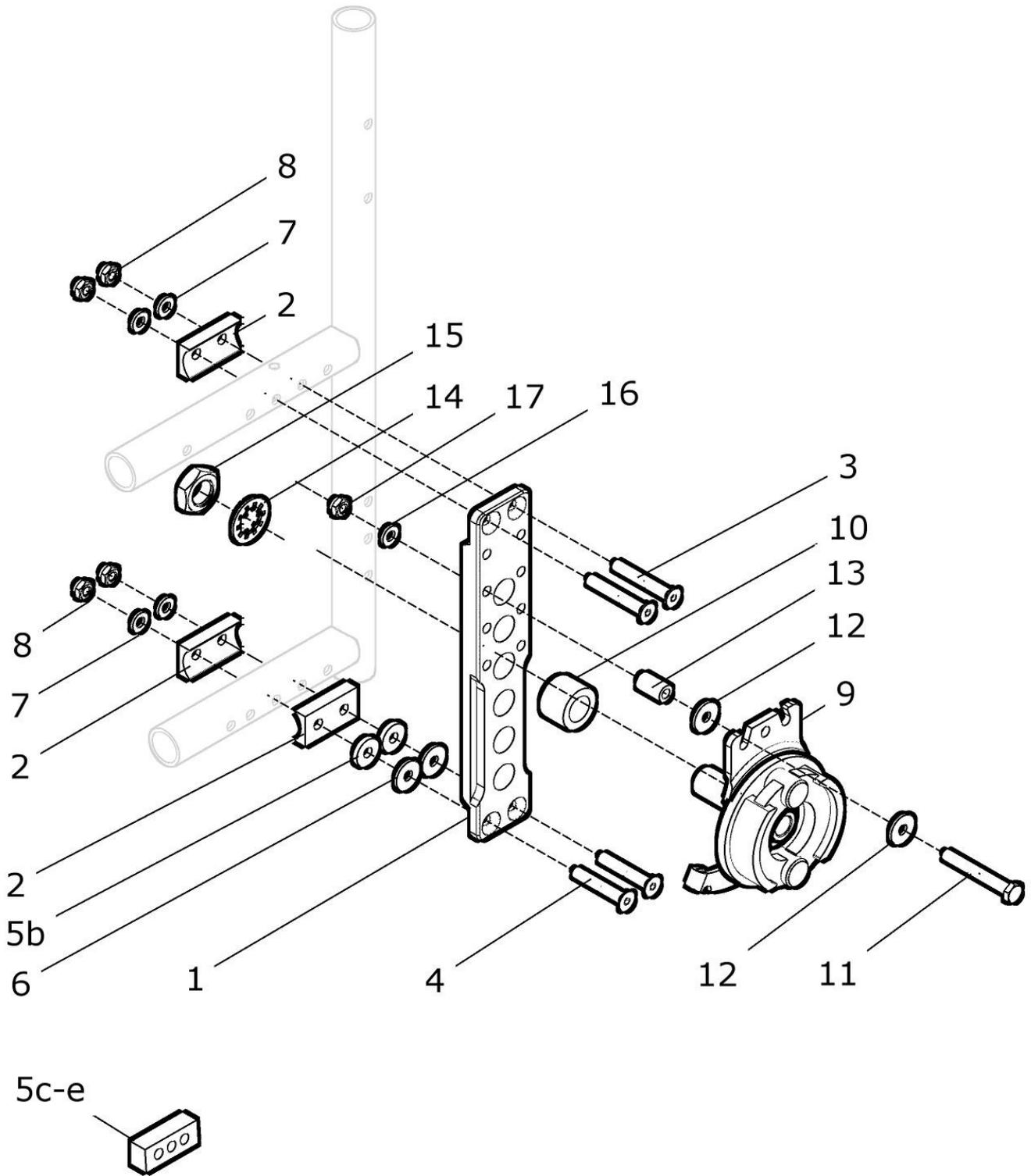


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1 – 8	50 661 10	Lochplatte für Trommelbremse außen montiert kpl. Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben Sturz: ?		2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2 – 4e, 5d, 7, 8	50 621 99	Montageset	Sturz 10°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
4e	01 120 24	Senkschraube M6x80 - DIN 7991	Sturz 10°	4 St.
zu 5	-----	Ohne Scheibe		-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
5d	50 621 08	Distanzblock 33mm		2 St.
zu 6	-----	Ohne Scheibe		-
6	01 320 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		8 St.
9b–17	50 662 10	Bremsträger Trommelbremse rechts kpl. (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		2 St.
9a–17	50 663 10	Bremsträger Trommelbremse links kpl. (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		2 St.
9a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)		1 St.
9b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)		1 St.

10a	50 661 17	Distanz 6mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L6mm)	2 St.
10b	01 212 05	Distanz 9mm	(= Mutter M16x1 SW22)	2 St.
10c	50 622 21	Distanz 15mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L15mm)	2 St.
10d	50 661 12	Distanz 18mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L18mm)	2 St.
10e	50 622 22	Distanz 20mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L20mm)	2 St.
11a	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	(bei 6mm Distanz)	2 St.
11b	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	(bei 9mm Distanz)	2 St.
11c	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	(bei 15mm Distanz)	2 St.
11d	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931	(bei 18mm Distanz)	2 St.
11e	01 110 08	Sechskantschraube M6x50 - DIN 931	(bei 20mm Distanz)	2 St.
12	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
13a	25 225 13	Distanzröllchen 6mm (D13 x d6,2 x L6)	(bei 6mm Distanz)	2 St.
13b	50 661 15	Distanzröllchen 9mm (D10 x d6 x L9)	(bei 9mm Distanz)	2 St.
13c	U25 661 03	Distanzröllchen 14mm (D10 x d6 x L14)	(bei 15mm Distanz)	2 St.
13d	50 661 16	Distanzröllchen 18mm (D10 x d6 x L18)	(bei 18mm Distanz)	2 St.
13e.1	50 661 16	Distanzröllchen 18mm (D10 x d6 x L18)	(bei 20mm Distanz)	2 St.
13e.2	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	(bei 20mm Distanz)	2 St.
14	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN		2 St.
15	01 212 06	Mutter M16x1 SW24		2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		2 St.
17	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985		2 St.

Die Distanzen 6mm, 9mm, 15mm, 18mm oder 20mm (Pos. 10, 11 und 13) werden je nach Seitenteil, je nach Sturz oder je nach Bereifung angebaut.

Antriebsrad Trommelbremse

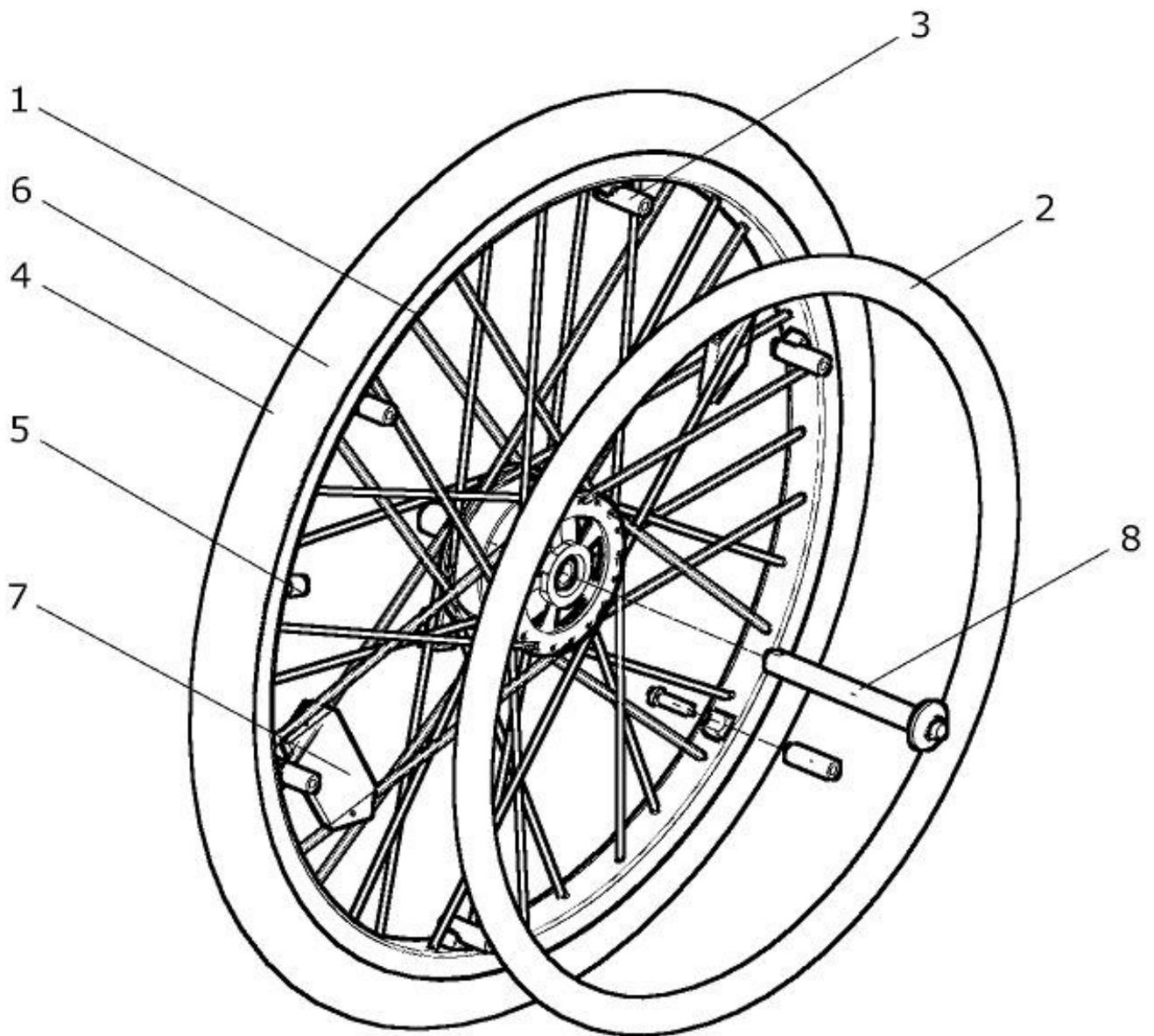

Antriebsrad Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 81	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 82	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 87	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 86	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 85S	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Edelstahl / pannensicher schwarz kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 83	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 84	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 661 88	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	50 661 50	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.

1, 4e – 7	50 661 58	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Luftbereifung Marathon Plus Evolution (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4h – 7	50 661 51	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 Pannensicher grau (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4g – 7	50 661 52	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	50 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 24“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	50 623 55	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	50 623 85	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	50 623 00	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	50 623 30	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	50 623 50	Greifring 24“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
2c	50 623 51	Greifring 24“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 59	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x25 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
4e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
4g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8“ pannensicher grau	1 St.
4h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1“ pannensicher grau	1 St.
4j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1“ pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	50 623 35	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 38	Greifring 24" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 84	Greifring 24" CURVE L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	50 623 94	Greifring 24" CURVE GRIP L / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3a	50 623 40	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau eng kpl. FM: ?	1 St.
2 – 3b	50 623 45	Greifring 24" Aluminum farbig / Anbau weit kpl. FM: ?	1 St.
2	05 124 70	Greifring 24" TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 81	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 82	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 85	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edeltstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 83	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 87	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 84	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 86	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	10 661 50	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b – 7	10 661 51	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	10 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	10 613 85	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	10 613 00	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.

2b – 3b	10 613 30	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	10 613 50	Greifring 22“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
4a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22“ CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22“ CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 20 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 72	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 71	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 74	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 73	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a, 3a	10 661 79	Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau eng (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: eng	1 St.
1, 2a, 3b	10 661 78	Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau weit (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: weit	1 St.
1	10 661 65	Speichenrad Trommelbremsnabe 20“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	30 633 15	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	30 633 30	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2a	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20“ Edelstahl (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20“ x 1“ feinprofil	1 St.
4c	05 120 51	Bereifung 20“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.

4d	05 120 52	Bereifung 20" x 1 pannensicher grau	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	30 633 65	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse „Black-Edition“

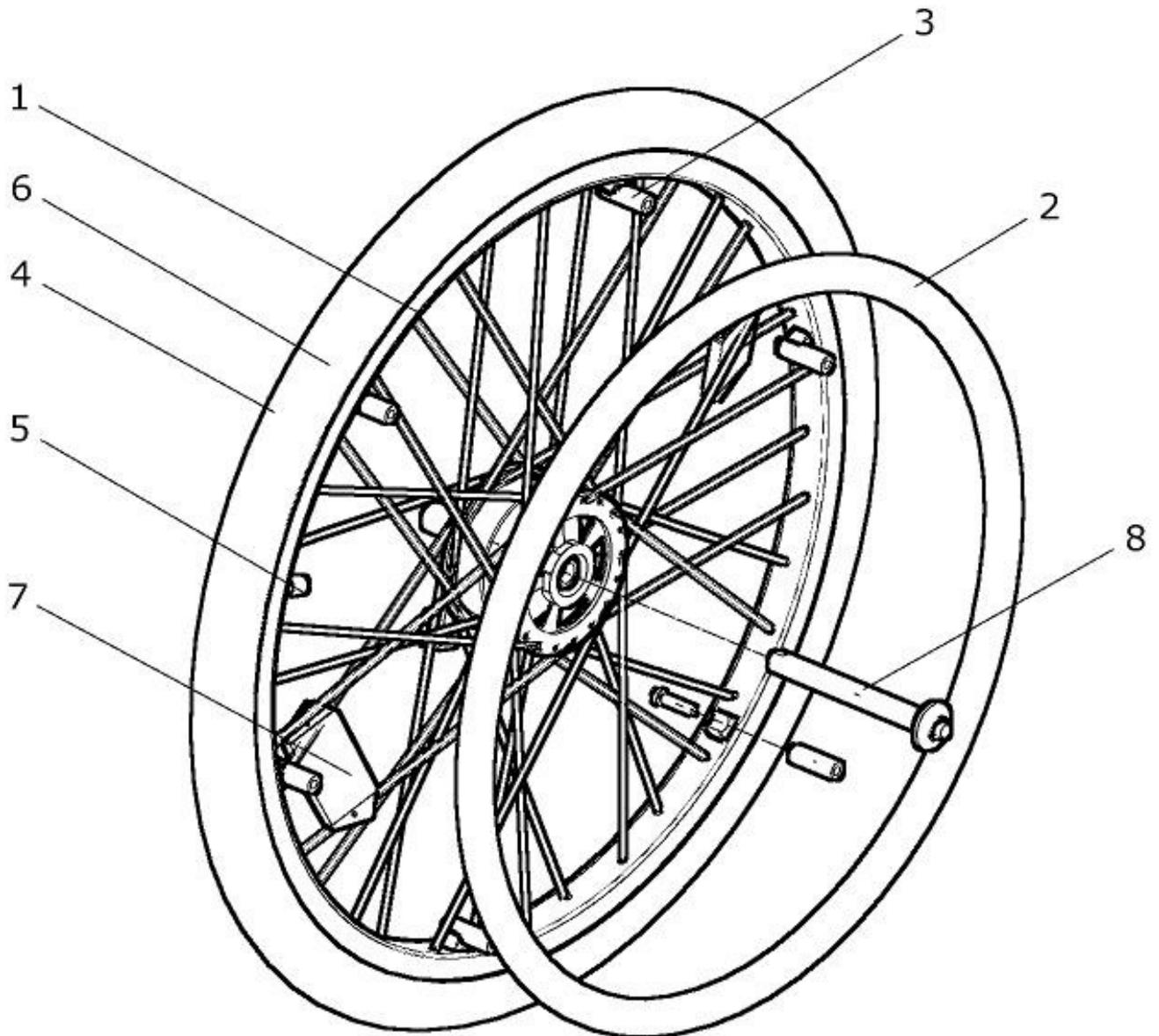

Antriebsrad Trommelbremse 24“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 666 81	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung SENTINEL Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 666 82	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / MarathonPlusEvolution kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung Marathon Plus Evolution Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	50 666 83	Antriebsrad Tr.br. 24“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 24“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	50 666 59	Speichenrad Trommelbremsnabe 24“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	50 623 55	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3b	50 623 85	Greifring 24“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2	50 623 56	Greifring 24“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
3c	50 623 59	Greifringanbau-Set super eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x25 und Distanzen Alu kurz L=14mm)	1 St.
4a	05 124 45	Laufdecke 24“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarze Decke)	1 St.
4b	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4c	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 22“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 666 81	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung SENTINEL Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 82	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / MarathonPlusEvolution kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung Marathon Plus Evolution Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 83	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	10 666 59	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	10 613 55	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3b	10 613 85	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
4a	05 122 45	Laufdecke 22“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarz Decke)	1 St.
4b	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4c	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 20“ „Black-Edition“

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 666 41	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 „Black-Edition“ / SENTINEL fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe schwarz und mit Aluminium Greifring schwarz mit Bereifung SENTINEL Luftbereifung 20“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 666 42	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 „Black-Edition“ / pannensicher schwarz kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1	10 666 29	Speichenrad Trommelbremsnabe 20“ schwarz (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2 – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2 – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 45	Laufdecke 20“ x 1“ SENTINEL feinprofil (schwarze Decke)	1 St.
4b	05 120 53	Bereifung 20“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5	05 120 22	Schlauch 20“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 666 12	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe schwarz	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)




Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 662 80	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 3/8 Luft. grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 81	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 82	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 Luft. feinprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 24“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	40 662 83	Antriebsrad Tr.Br. mit SAFETY-GRIP 24“x1 pannen. grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 24“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	40 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 24“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 124 41	Laufdecke 24“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 124 42	Laufdecke 24“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 124 43	Laufdecke 24“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 124 48	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus (graue Decke)	1 St.
2e	05 124 49	Laufdecke 24“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2f	05 124 47	Laufdecke 24“ x 1“ DownTown	1 St.
2g	05 124 52	PU-Bereifung 24“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2h	05 124 51	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2j	05 124 53	PU-Bereifung 24“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 124 21	Schlauch 24“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 124 22	Schlauch 24“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 662 80	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 81	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 82	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 662 83	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22“x1 pannen. grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Speichenschutz

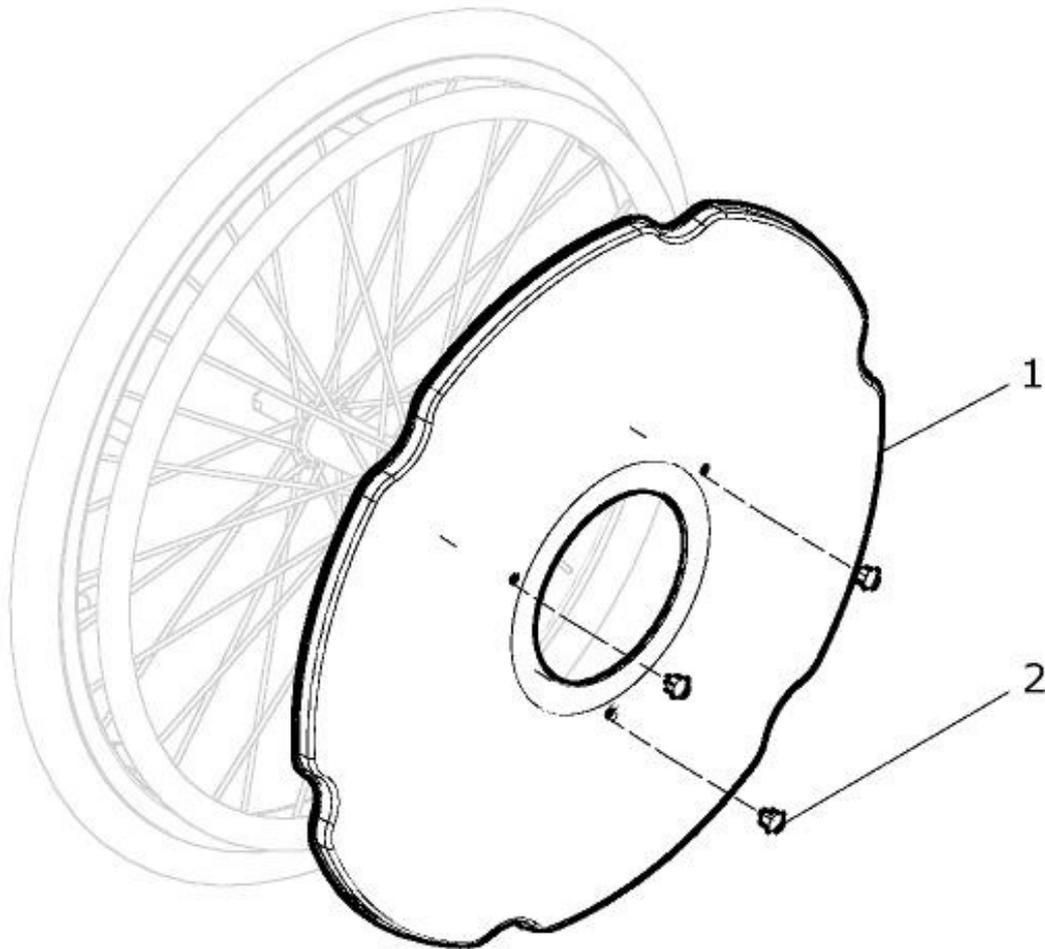


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	10 624 00	Speichenschutz 20" transparent kpl.	1 St.
1	10 624 01	Speichenschutz 20" transparent	1 St.
o. Bild	04 250 03	Aufkleber BeRollKa	2 St.
2	50 624 91	Clip für Speichenschutzbefestigung	3 St.
1 – 2	10 614 00	Speichenschutz 22" transparent kpl.	1 St.
1	10 614 01	Speichenschutz 22" transparent	1 St.
1 – 2	50 624 00	Speichenschutz 24" transparent kpl.	1 St.
1	50 624 01	Speichenschutz 24" transparent	1 St.

Greifringüberzug

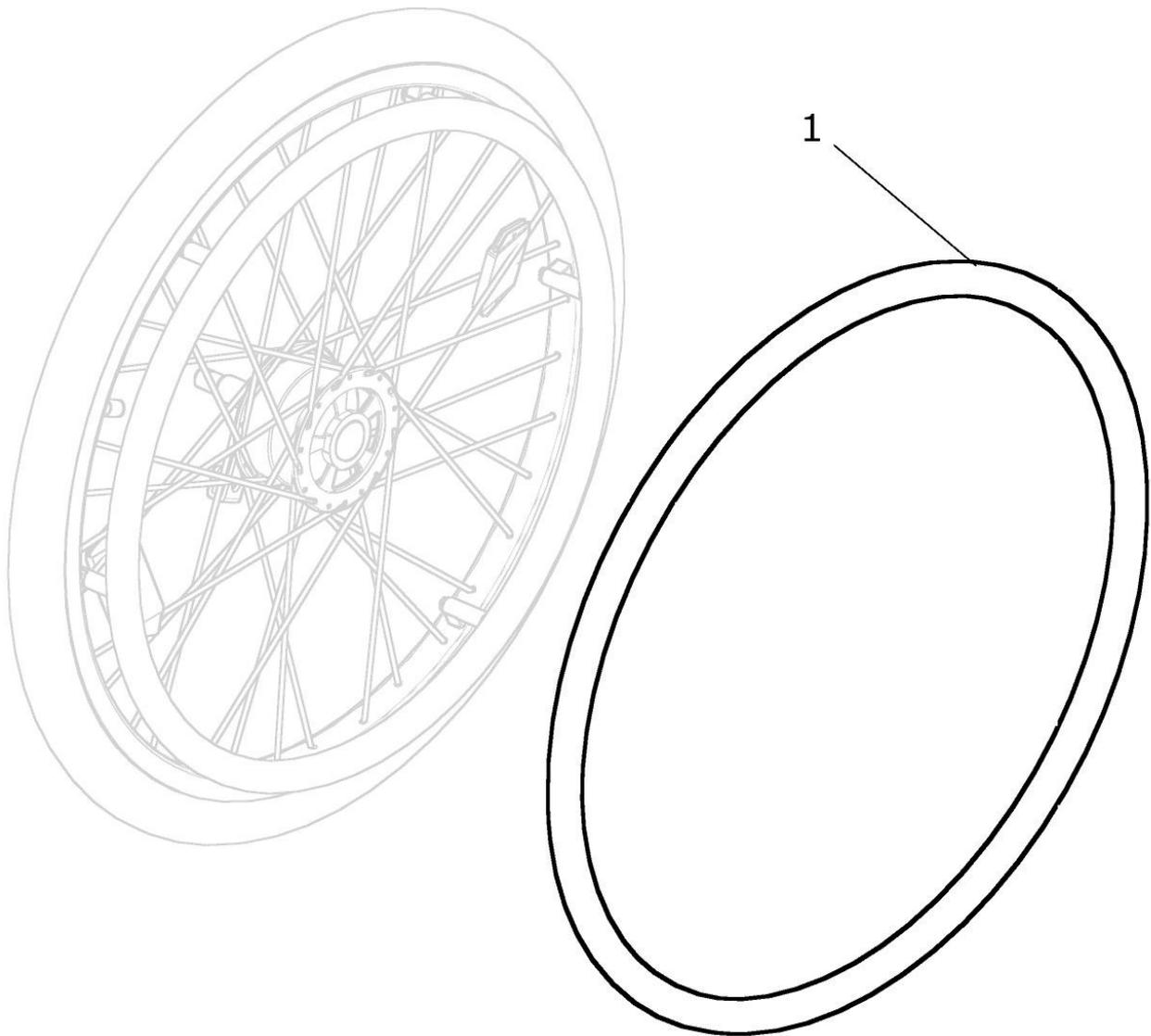


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	05 120 11	Greifringüberzug 20" glatt schwarz	1 St.
1	05 122 11	Greifringüberzug 22" glatt schwarz	1 St.
1	05 124 11	Greifringüberzug 24" glatt schwarz	1 St.

Radstandsverlängerung standard

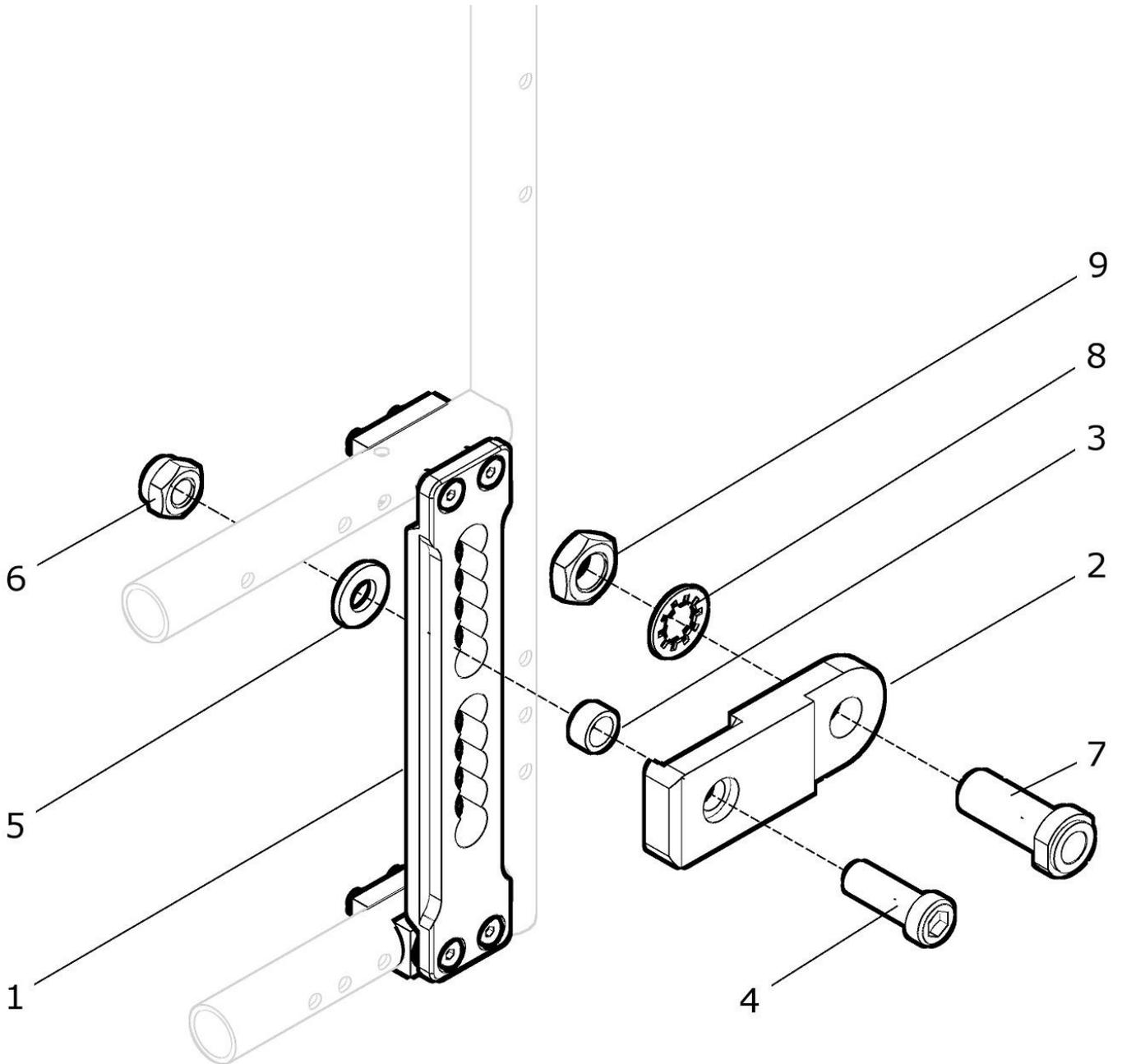

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 625 10	Radstandsverlängerung mit Lochplatte standard kpl. mit Montageset 0° Sturz ohne Einschraubadapter	2 St.
1	50 621 10	Lochplatte standard außen montiert kpl. mit Montageset 0° Sturz	2 St.
2a - 6	50 625 00	Radstandsverlängerung kpl. ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (68mm nach hinten)	2 St.
2a	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 625 02	Buchse	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
7 – 9	50 622 25	Einschraubadapter ½"x51mm ohne Buchse kpl.	2 St.
7	01 195 01	Einschraubadapter	2 St.
8	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
9	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	2 St.
2b - 6	50 625 20	Radstandsverlängerung UNITOMIC kpl. ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (100mm nach hinten)	2 St.
2b	50 625 21	Radstandsverlängerung unitomic (100mm nach hinten)	2 St.

Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter

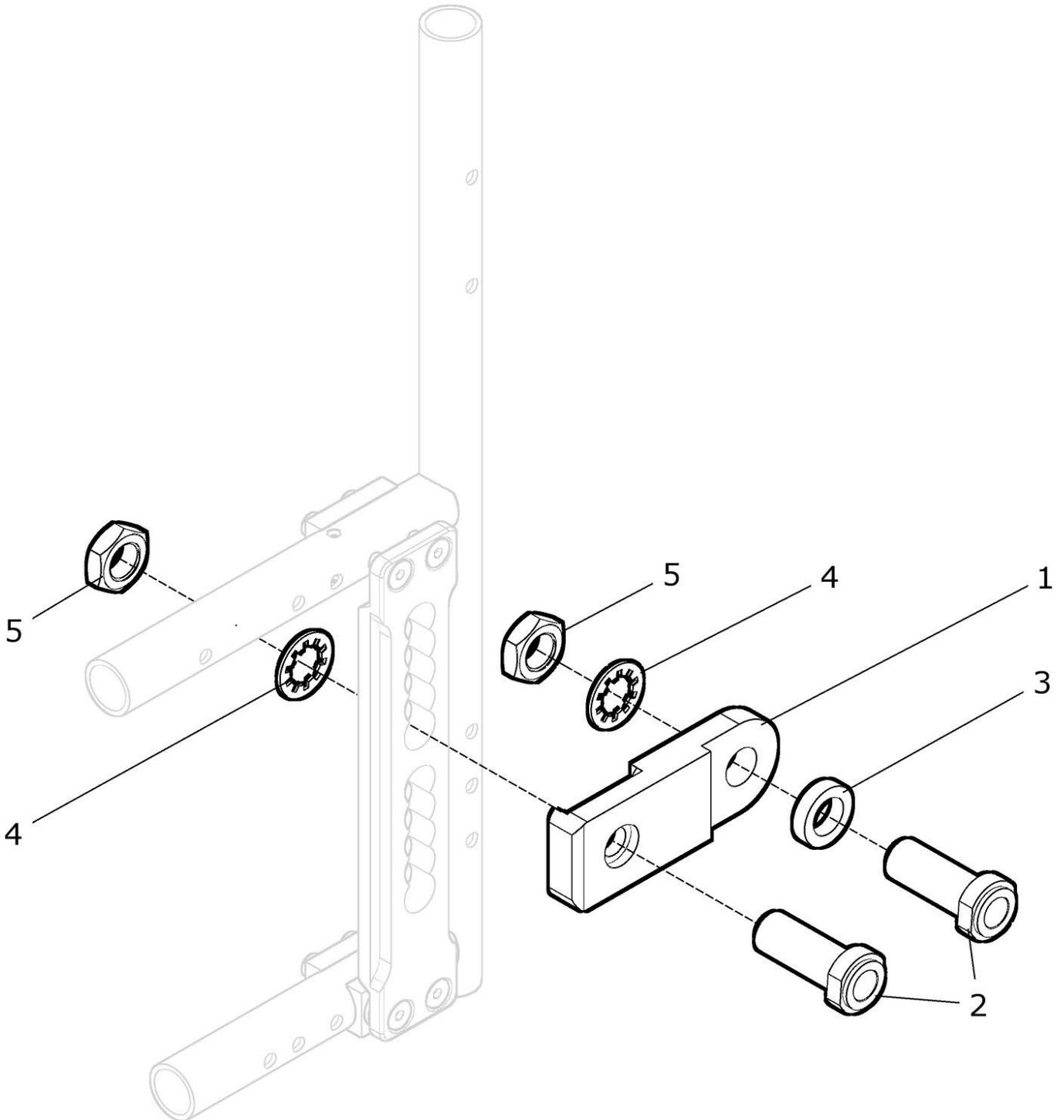

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	50 625 50	Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter kpl. ohne Lochplatte (68mm nach hinten)	2 Set
1	50 625 51	Radstandsverlängerung für 2 Adapter (68mm nach hinten)	2 St.
2	01 195 01	Einschraubadapter 1/2" x 51mm	4 St.
3	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
4	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	4 St.
5	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	4 St.


vorne eingebaut:

2, 4 – 5	50 622 25	Einschraubadapter 1/2"x51mm ohne Buchse kpl. mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	2 St.
-------------	-----------	---	--------------

hinten eingebaut:


2 – 5	50 622 20	Einschraubadapter 1/2"x51mm mit 6mm Buchse kpl. mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	2 St.
-------	-----------	--	--------------

Radstandsverlängerung für Trommelbremse

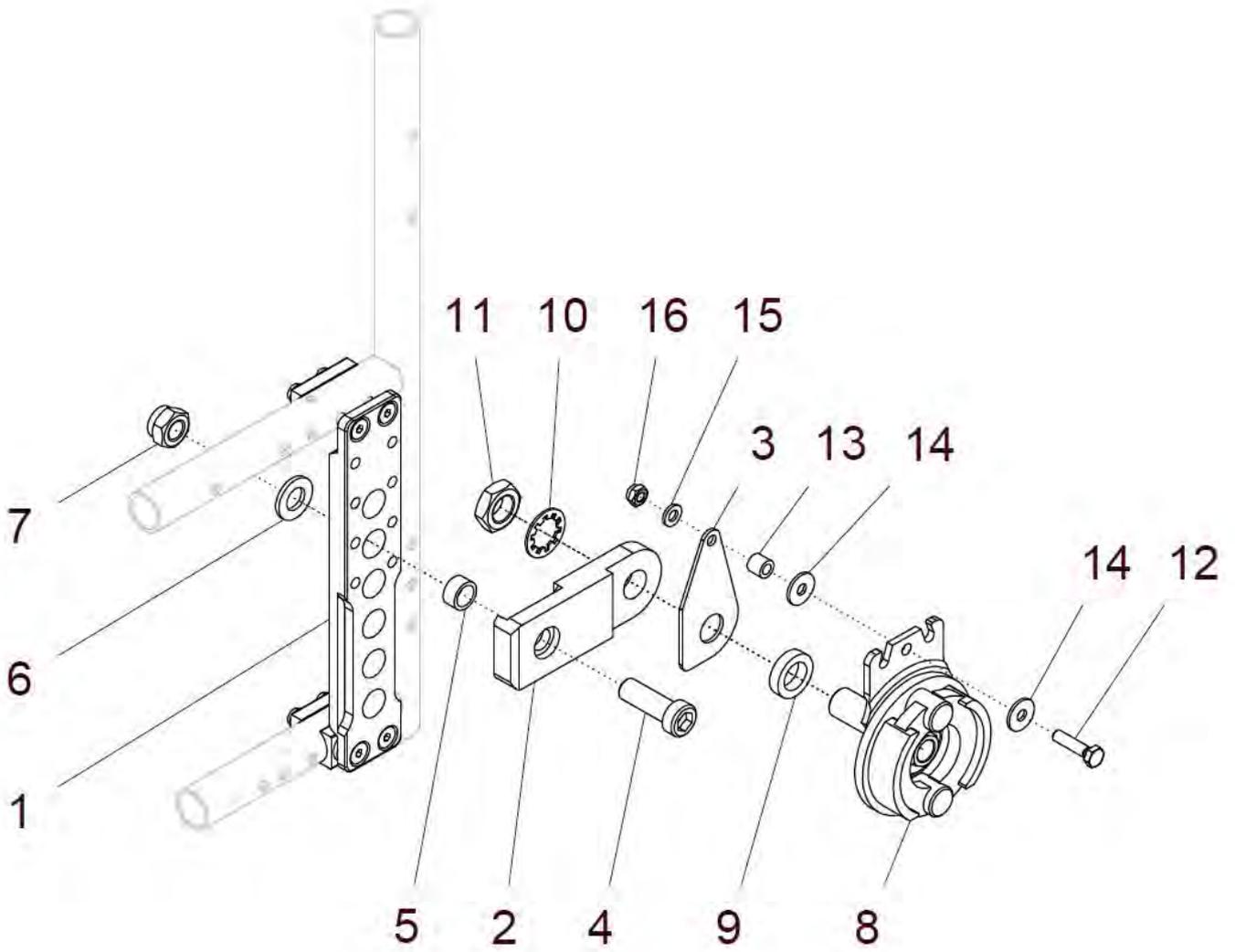

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 25	Radstandsverlängerung für Trommelbremse mit Lochplatte kpl. Radstandsverlängerung (68mm nach hinten) mit Gegenhalter und mit Lochplatte für Trommelbremse für 0° Sturz (ohne Bremsträger)	2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	50 661 20	Radstandsverlängerung Trommelbremse kpl. mit Gegenhalter (Radstandsverlängerung 68mm nach hinten) ohne Lochplatte / ohne Bremsträger	2 St.
2	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 661 21	Gegenhalter	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	50 625 02	Buchse	2 St.
6	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
7	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A rechts montiert (Hebel zeigt nach rechts) <small>Wird bei Radstandsverlängerung auf die rechte Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.</small>	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B links montiert (Hebel zeigt nach links) <small>Wird bei Radstandsverlängerung auf die linke Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.</small>	1 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW 24	2 St.
12	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
13	50 661 15	Distanzröllchen 9mm	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring - Junior2

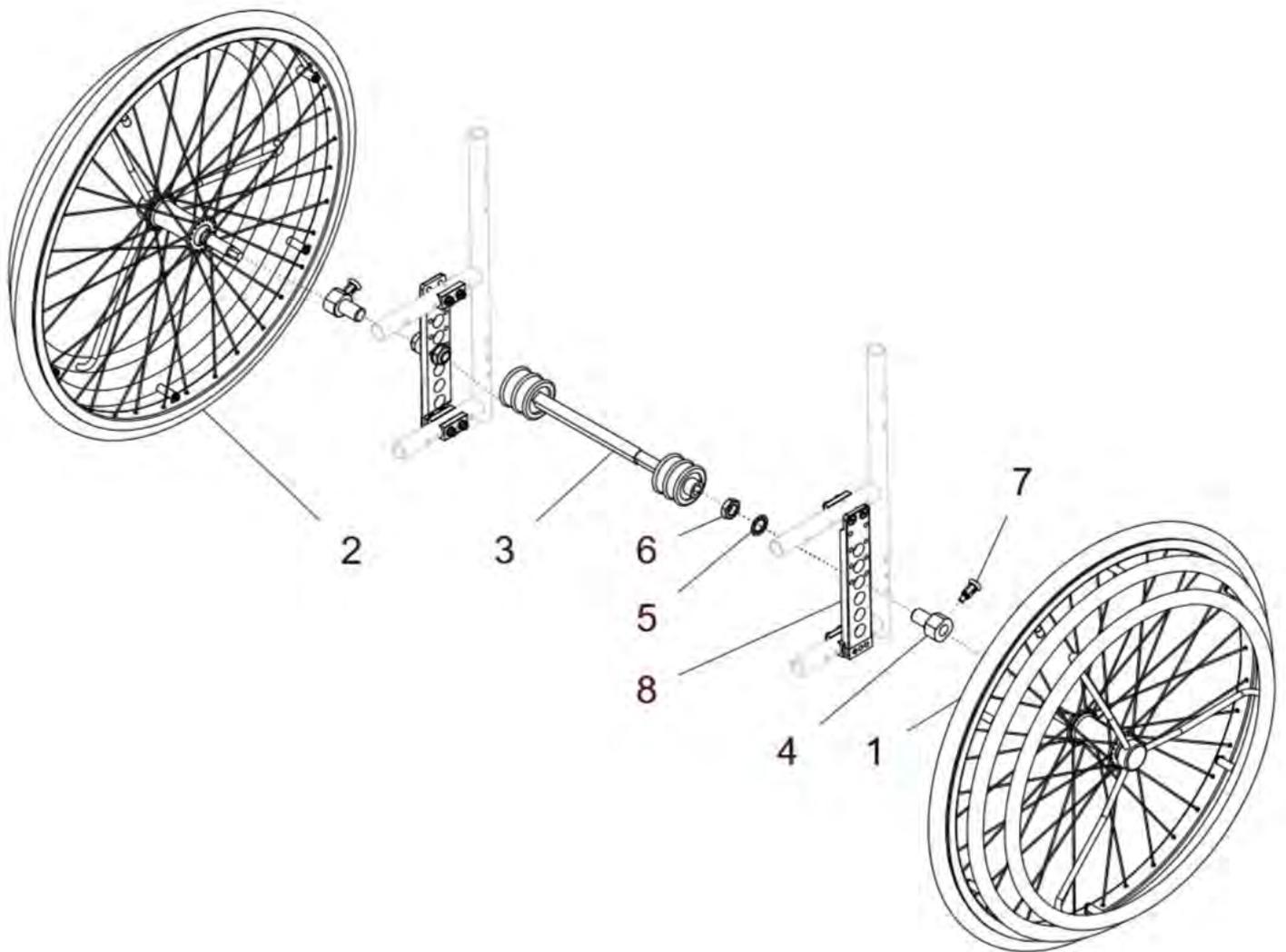

Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	50 670 00	Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b - 7	25 670 00	Einhandantrieb 24“ mit Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	50 672 00	Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 672 00	Antriebsrad 24“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng mit Doppelgreifring eng aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 672 50	angetriebene Rad 24“ ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenken 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenken 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenken 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenken 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenken 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	50 671 10	Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen	2 St.
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

8a	50 671 00	Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
8b	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
9 o. Bild	50 623 00	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
9.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb 24 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 670 80	Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	25 670 80	Umbausatz Einhandantrieb 24“ Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	10 670 00	Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b - 7	22 670 00	Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 672 00	Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 672 00	Antriebsrad 22“ mit Doppel-Greifring Edelstahl eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 672 50	angetriebene Rad 22“ ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenken 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenken 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenken 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenken 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenken 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	50 671 10	Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen	2 St.
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

8a	50 671 00	Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
8b	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
9 o. Bild	10 613 00	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
9.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
9.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:


Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 670 80	Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	22 670 80	Umbausatz Einhandantrieb 22“ Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

Lochplatte für Einhandantrieb (außen montiert)

0°, 2°, 4°, 7°Sturz

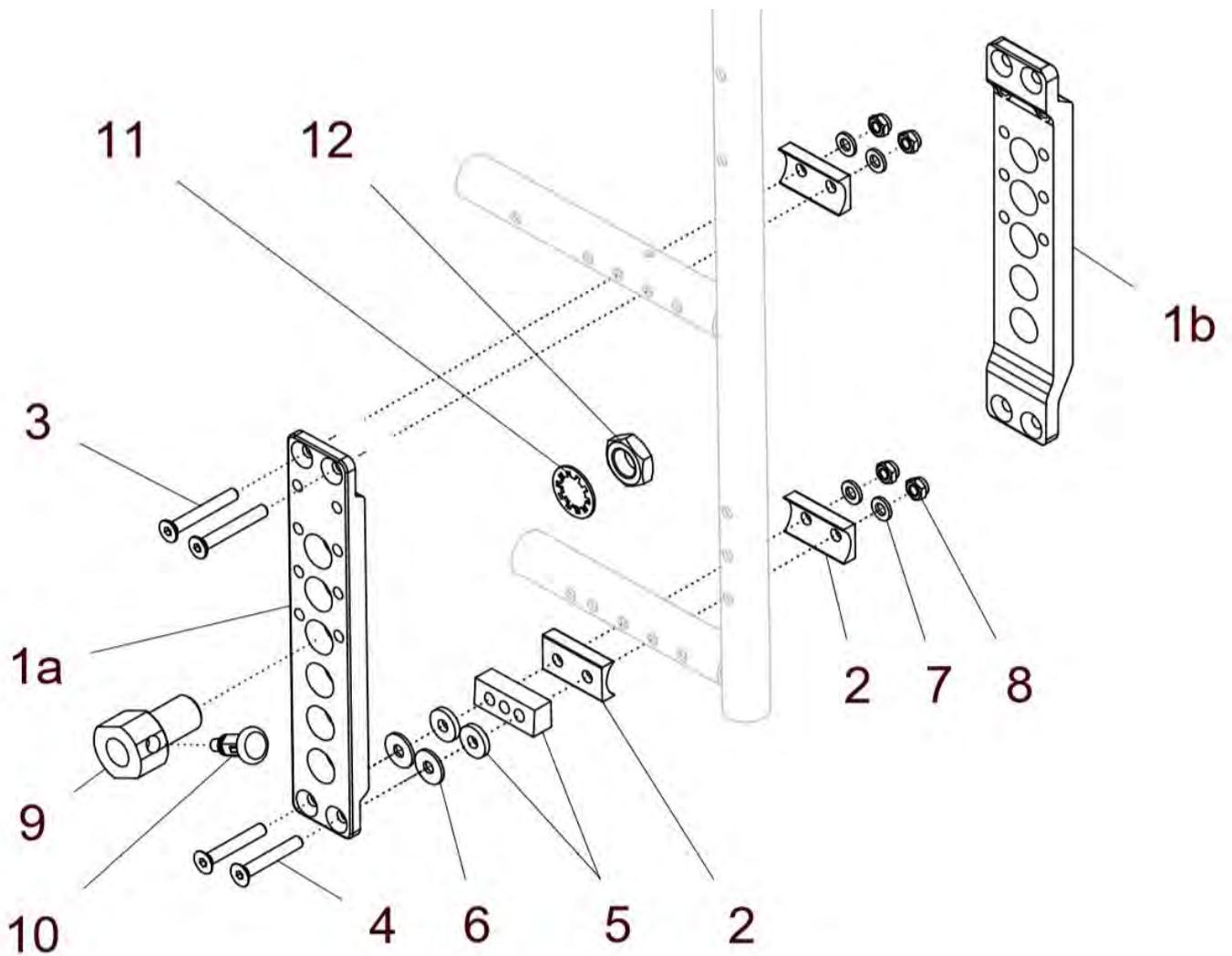

Lochplatte gerade:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	50 671 00	Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
9 – 12	50 671 10	Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen		2 St.
9	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb		2 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 18 zn		2 St.
12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter EHA		2 St.

Lochplatte tief:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	50 671 05	Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe		--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe		4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring und mit Trommelbremse - Junior2

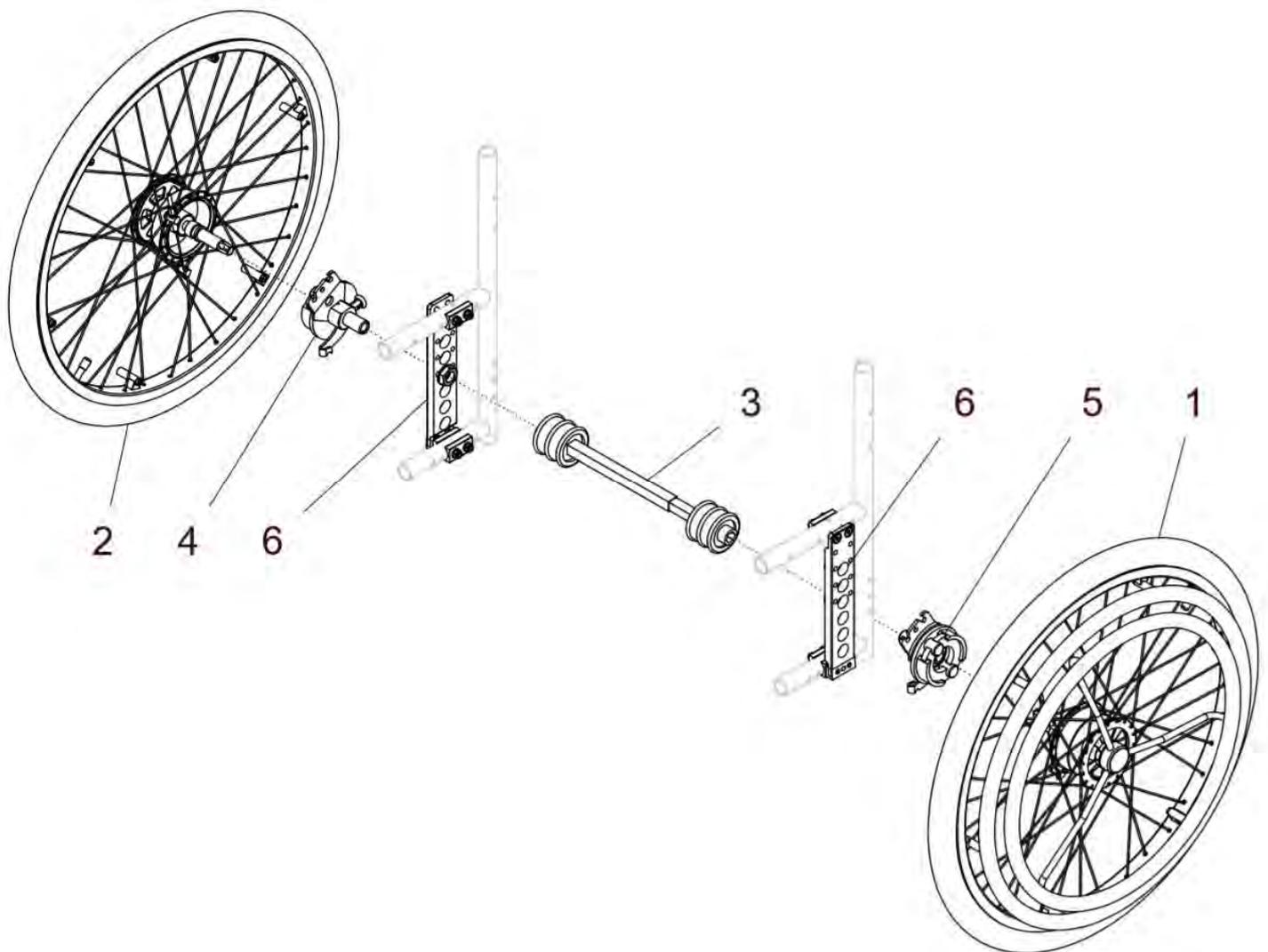

Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	50 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b – 5	25 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 24“ Doppelgreifring eng kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	50 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	25 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppel-Greifring eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	50 677 50	angetriebene Rad Trommelbremse 24“ ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelen 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelen 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelen 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelen 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelen 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	50 671 00	Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6b	50 671 50	Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
6c	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6d	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
7 o. Bild	50 623 00	Greifring 24“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
7.1	50 623 01	Greifring 24“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet. Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	50 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 24“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	25 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 24“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	10 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b – 5	22 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring eng kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 677 50	angetriebene Rad Trommelbremse 22“ ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelen 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelen 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelen 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelen 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelen 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	50 671 00	Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6b	50 671 50	Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
6c	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6d	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
7 o. Bild	10 613 00	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
7.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet.


Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	22 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse
(außen montiert)**

0° / 2° / 4° / 7° Sturz

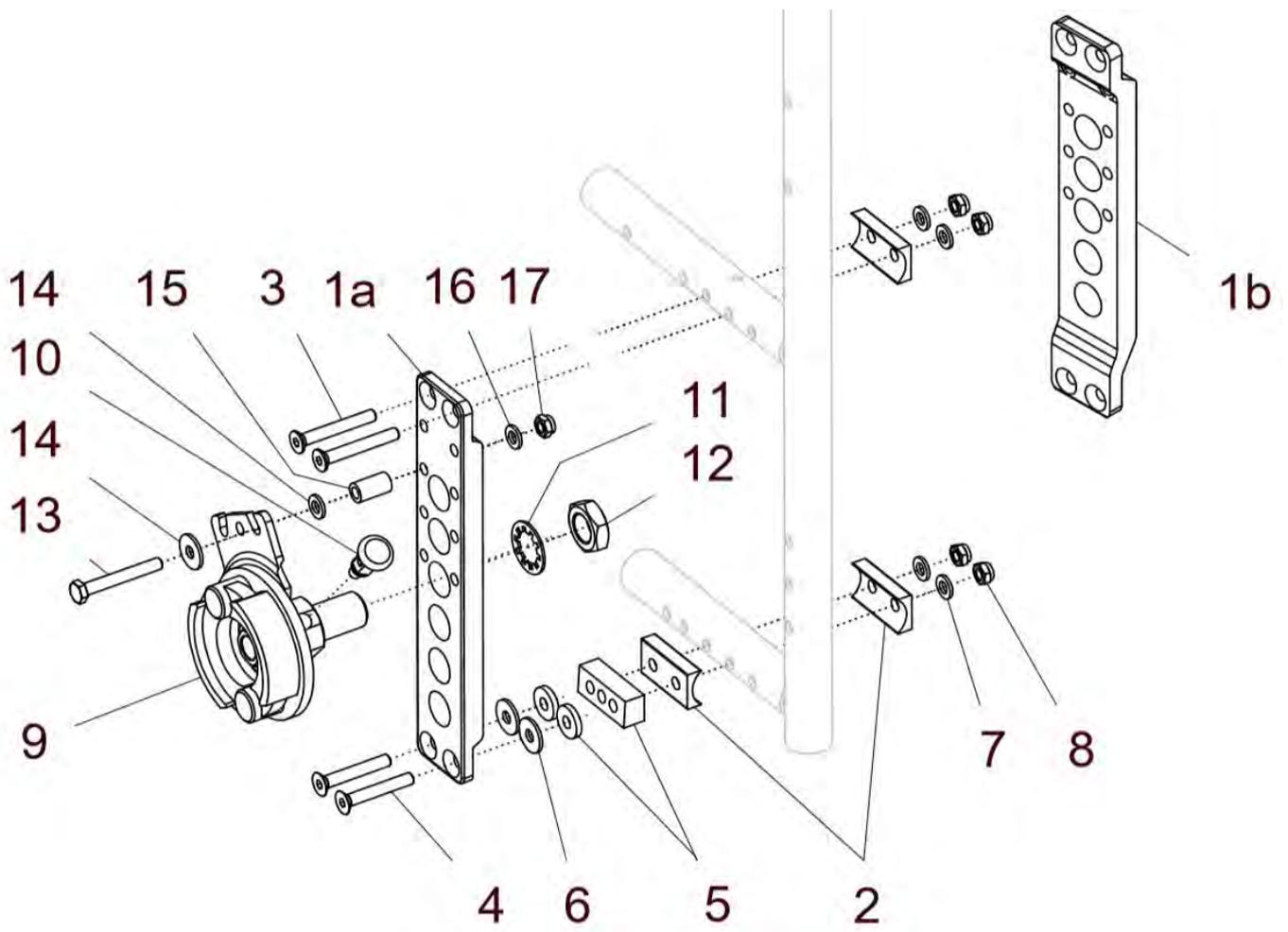

Lochplatte gerade:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	50 671 00	Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe		--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe		4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
9a – 17	50 676 20	Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9b – 17	50 676 30	Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)		1 St.
9b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)		1 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn		2 St.


12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
13	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 A2	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
15	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
17	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	50 671 05	Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe		--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe		4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse
(innen montiert)**

0° / 2° Sturz

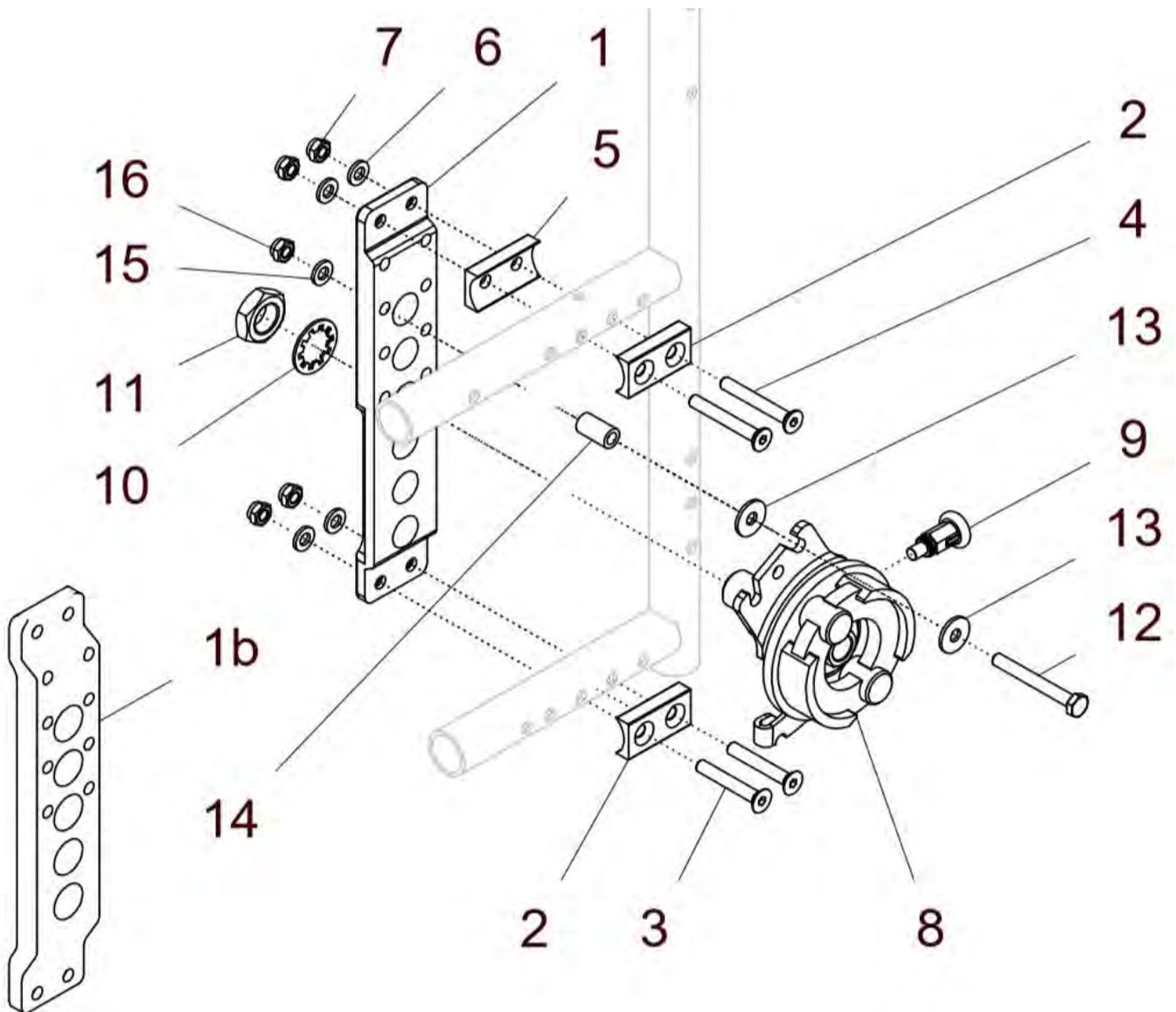

Lochplatte gerade (innen montiert):

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	50 671 50	Lochplatte gerade für EHA innen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 0° / 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN985	8 St.


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
8a – 16	50 676 20	Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	1 St.
8b – 16	50 676 30	Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	1 St.
8a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)	1 St.
8b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)	1 St.
9	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)	2 St.
10	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn	2 St.
11	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
12	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380 vz	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
14	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
16	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief (innen montiert):

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	50 671 55	Lochplatte tief für EHA innen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	2 St.
1a	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 0° / 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Radabdeckung Kunststoff an Lochplatte montiert


(bei Verwendung Lochplatte standard mit Steckachsenadapter 1/2")

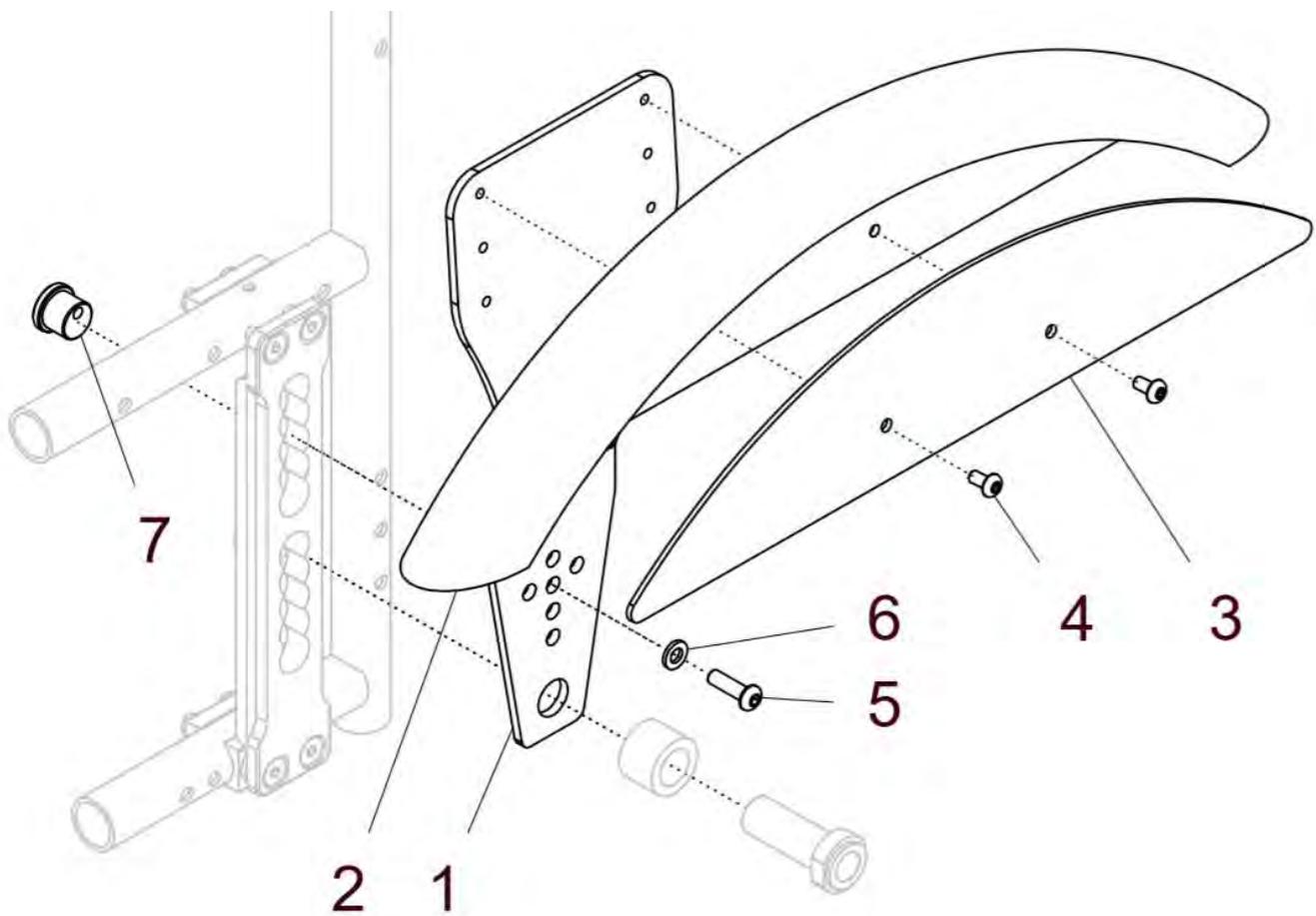

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 630 00	Radabdeckung Kunststoff mit Halterung kpl. Radabdeckung aus Kunststoff mit Halterung Ø16 für Anbau an Lochplatte standard (ohne Lochplatte)	2 St.
1	50 630 01	Halterung rechts / links für Radabdeckung (Ø16)	2 St.
2	50 630 11	Radabdeckung re./li. Kunststoff schwarz für Rollstühle	2 St.
3	50 630 12	Verstärkung für Radabdeckung Kunststoff Rollstühle	2 St.
4	01 154 09	Linsenkopfschraube M5x10 - ISO 7380 zns	4 St.
5	01 154 24	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380 zns	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
7	50 630 02	Befestigungsbolzen für Halterung an Lochplatte	2 St.

Radabdeckung Kunststoff an Trbr.-Lochplatte montiert


(bei Verwendung Trbr.-Lochplatte mit Bremsträger Trommelbremse)

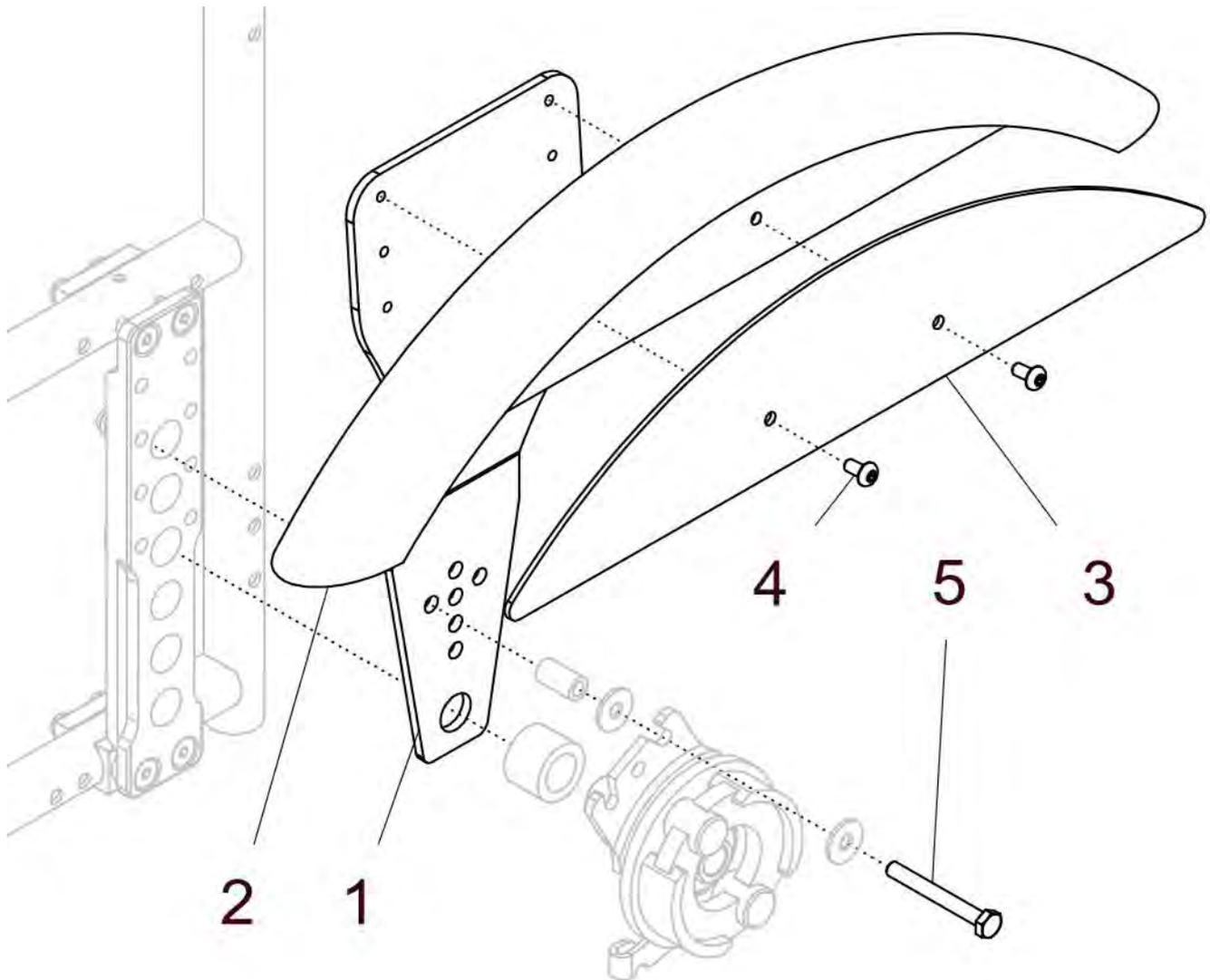

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	50 630 60	Radabdeckung Kunststoff mit Halterung bei Trbr. kpl. Radabdeckung aus Kunststoff mit Halterung Ø16 für Anbau an Trbr.-Lochplatte (ohne Lochplatte) Verwendete Distanz: ?	2 St.
1	50 630 01	Halterung rechts / links für Radabdeckung (Ø16)	2 St.
2	50 630 11	Radabdeckung re./li. Kunststoff schwarz für Rollstühle	2 St.
3	50 630 12	Verstärkung für Radabdeckung Kunststoff Rollstühle	2 St.
4	01 154 09	Linsenkopfschraube M5x10 - ISO 7380 zns	4 St.
5a	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931 (bei 6mm Distanz)	2 St.
5b	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931 (bei 9mm Distanz)	2 St.
5c	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 (bei 15mm Distanz)	2 St.
5d	01 110 08	Sechskantschraube M6x50 - DIN 931 (bei 18mm Distanz)	2 St.
5e	01 110 09	Sechskantschraube M6x55 - DIN 931 (bei 20mm Distanz)	2 St.

Radabdeckung Kunststoff an Lochplatte gerade f. Einhandantrieb montiert

(bei Verwendung Lochplatte gerade EHA mit Einschraubadapter EHA Ø18)

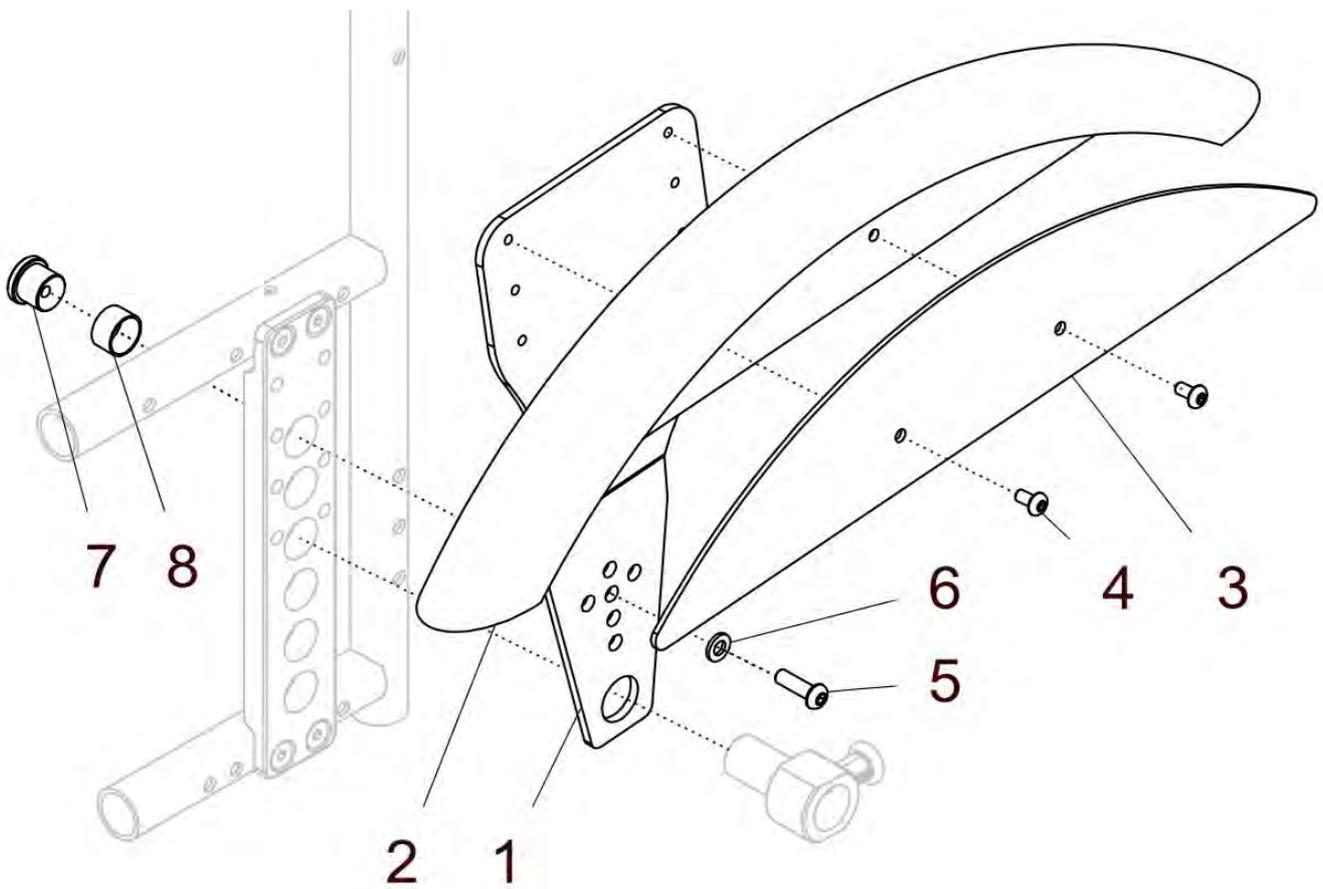


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	50 631 00	Radabdeckung Kunststoff mit Halterung f. EHA kpl. Radabdeckung aus Kunststoff mit Halterung Ø18 für Anbau an Lochplatte gerade Einhandantrieb (ohne Lochplatte)	2 St.
1	50 631 01	Halterung rechts / links für Radabdeckung EHA (Ø18)	2 St.
2	50 630 11	Radabdeckung re./li. Kunststoff schwarz für Rollstühle	2 St.
3	50 630 12	Verstärkung für Radabdeckung Kunststoff Rollstühle	2 St.
4	01 154 09	Linsenkopfschraube M5x10 - ISO 7380 zns	4 St.
5	01 154 24	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380 zns	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
7	50 630 02	Befestigungsbolzen für Halterung an Lochplatte	2 St.
8	U55 661 01	Distanzbuchse Ø17,9 / Ø16 L=8	2 St.

Hinweis: Radabdeckung mit Lochplatte EHA tief ist nicht möglich !!

Radabdeckung Kunststoff an Lochplatte EHA mit Bremsträger montiert


(bei Verwendung Lochplatte gerade EHA mit Bremsträger Trommelbremse EHA Ø18)

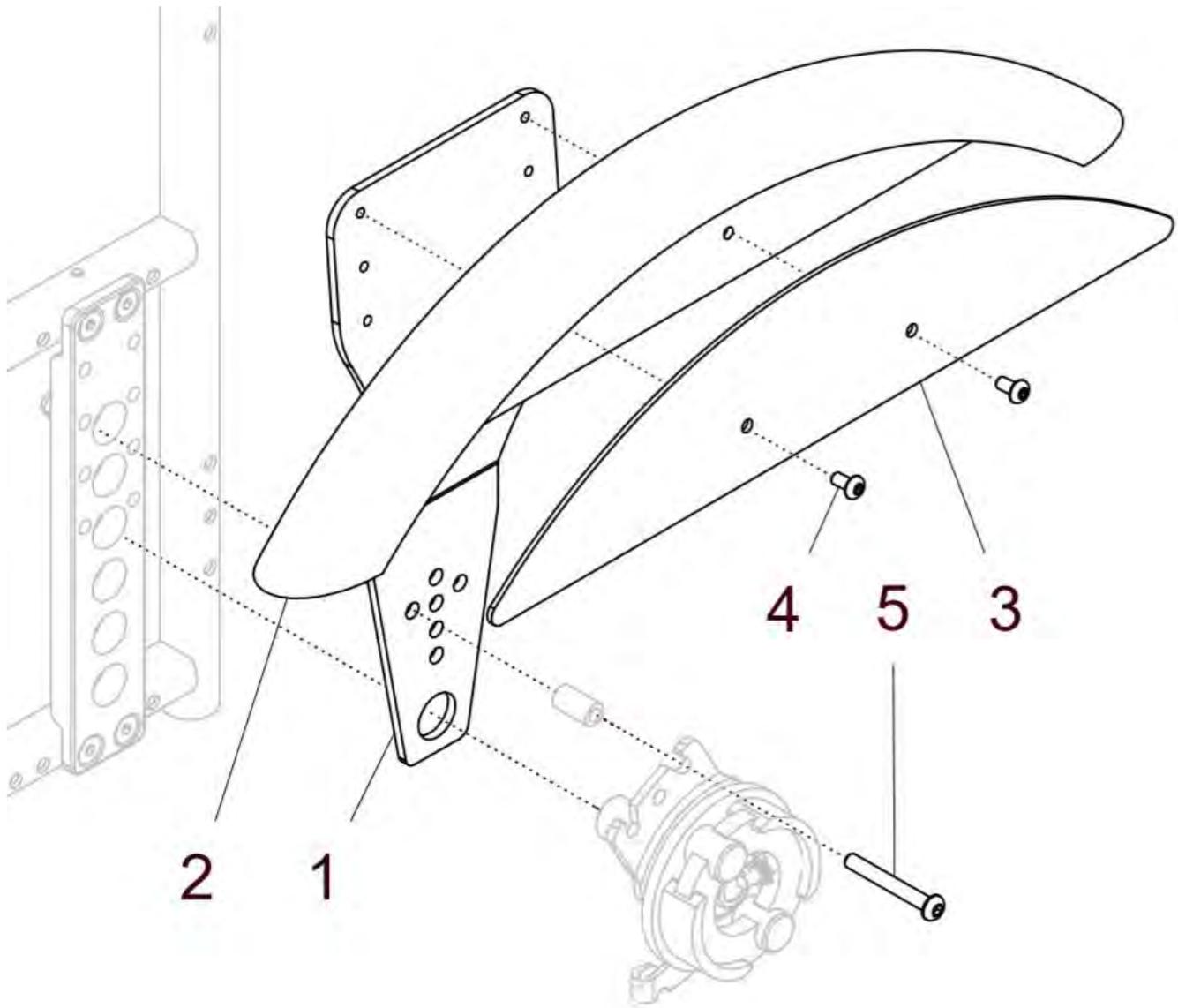

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	50 631 60	Radabdeckung Kunststoff mit Halterung f. EHA mit Trbr. kpl. Radabdeckung aus Kunststoff mit Halterung Ø18 für Anbau an Lochplatte gerade Einhandantrieb # bei Verwendung Einhandantrieb mit Trommelbremse # (ohne Lochplatte)	2 St.
1	50 631 01	Halterung rechts / links für Radabdeckung EHA (Ø18)	2 St.
2	50 630 11	Radabdeckung re./li. Kunststoff schwarz für Rollstühle	2 St.
3	50 630 12	Verstärkung für Radabdeckung Kunststoff Rollstühle	2 St.
4	01 154 09	Linsenkopfschraube M5x10 - ISO 7380 zns	4 St.
5	01 153 28	Linsenkopfschraube M6x50 - ISO 7380 vz	2 St.

Hinweis: Radabdeckung mit Lochplatte EHA tief ist nicht möglich !!

Lenkrad mit Schraubachse

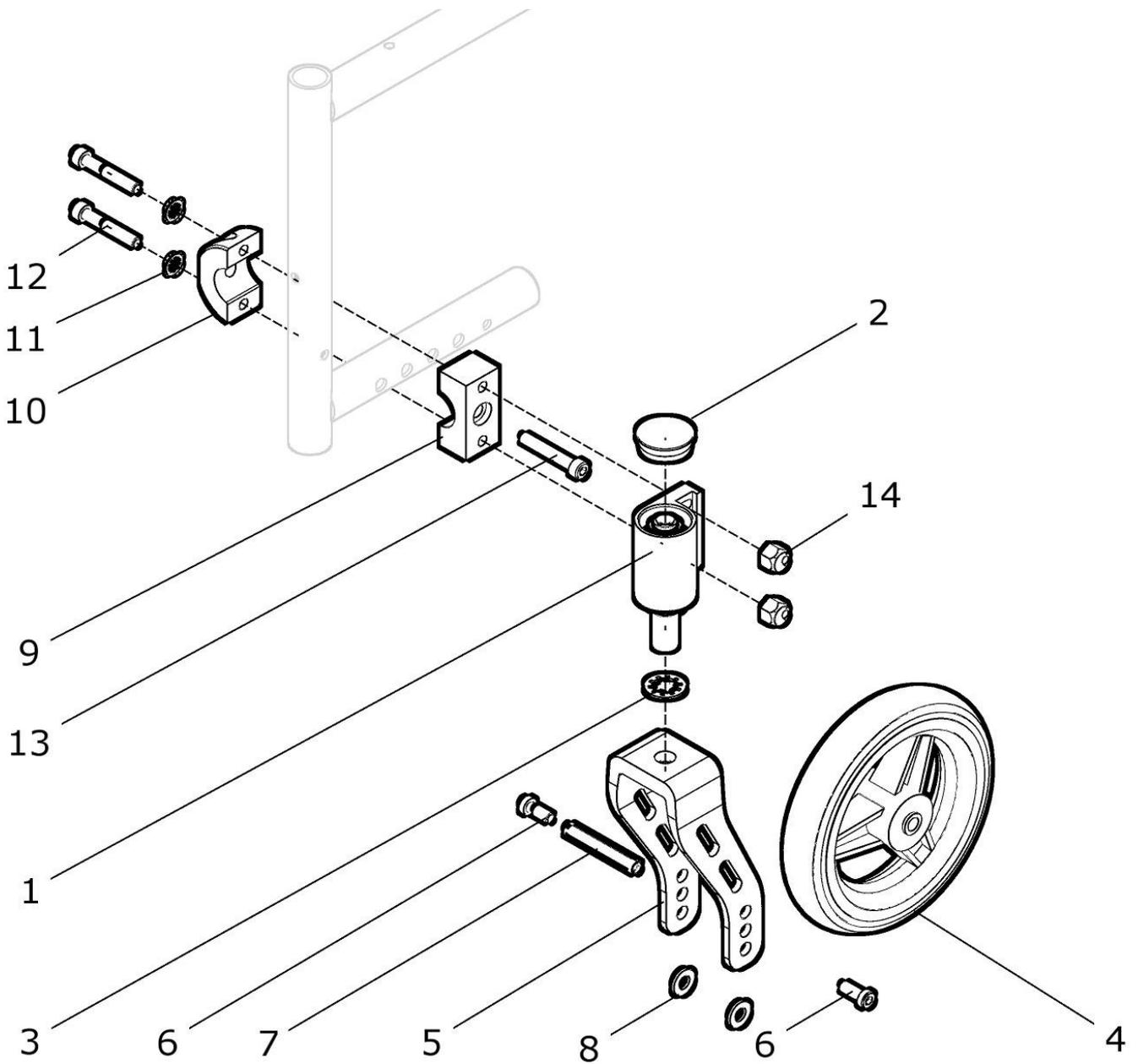

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4a, 5a - 14	40 640 02	Lenkradsatz 4“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4a, 5a – 14	40 640 22	Lenkradsatz 4“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4a, 5a - 14	40 640 32	Lenkradsatz 4“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4a, 5b - 14	40 640 07	Lenkradsatz 4“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4a, 5b – 14	40 640 27	Lenkradsatz 4“ Vollg. Rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4a, 5b – 14	40 640 37	Lenkradsatz 4“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4b, 5a – 14	40 644 02	Lenkradsatz 5“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4b, 5a – 14	40 644 22	Lenkradsatz 5“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4b, 5a – 14	40 644 32	Lenkradsatz 5“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4b, 5b - 14	40 644 07	Lenkradsatz 5“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4b, 5b – 14	40 644 27	Lenkradsatz 5“ Vollg. Rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4b, 5b – 14	40 644 37	Lenkradsatz 5“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4c, 5a – 14	40 643 02	Lenkradsatz 6“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4c, 5a – 14	40 643 22	Lenkradsatz 6“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4c, 5a – 14	40 643 32	Lenkradsatz 6“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4c, 5b - 14	40 643 07	Lenkradsatz 6“ Vollgummi, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4c, 5b – 14	40 643 27	Lenkradsatz 6“ Vollg. rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4c, 5b – 14	40 643 37	Lenkradsatz 6“ Vollg. links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.


1 – 4d, 5a – 14	40 645 02	Lenkradsatz 6“ luft, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4d, 5a – 14	40 645 22	Lenkradsatz 6“ luft rechts, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4d, 5a – 14	40 645 32	Lenkradsatz 6“ luft links, Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4d, 5b - 14	40 645 07	Lenkradsatz 6“ luft, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4d, 5b – 14	40 645 27	Lenkradsatz 6“ luft rechts, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4d, 5b – 14	40 645 37	Lenkradsatz 6“ luft links, Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4g, 5c – 14	40 646 07	Lenkradsatz 140mm Vollg-, Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4g, 5c – 14	40 646 27	Lenkradsatz 140mm Vollg. re. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4g, 5c – 14	40 646 37	Lenkradsatz 140mm Vollg. li. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1 – 4h, 5c – 14	40 646 08	Lenkradsatz 140mm Vollg-schwarz Design-Lenkradg. 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar)	1 Paar
1a – 4h, 5c – 14	40 646 28	Lenkradsatz 140mm Vollg. re. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts)	1 St.
1b – 4h, 5c – 14	40 646 38	Lenkradsatz 140mm Vollg. li. Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links)	1 St.
1a	50 642 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse	1 St.
1b	50 642 23	Lenkradadapter links mit Schraubachse	1 St.
2	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
3	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
4a, 5a, 6, 7a, 8a	40 641 10	Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4a, 5b, 6, 7a, 8a	40 641 20	Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkrad 4“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4b, 5a, 6, 7a	40 641 11	Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4b, 5b, 6, 7a	40 641 21	Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkrad 5“ Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.

4c, 5a, 6, 7a	40 641 12	Lenkrad 6" Vollgummi mit Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkrad 6" Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4c, 5b, 6, 7a	40 641 22	Lenkrad 6" Vollgummi mit Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkrad 6" Vollgummi mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4d, 5a, 6, 7a	40 641 13	Lenkrad 6" luftbereift mit Lenkradgabel 39x132 kpl. Lenkrad 6" luftbereift mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4d, 5b, 6, 7a	40 641 23	Lenkrad 6" luftbereift mit Lenkradgabel 39x170 kpl. Lenkrad 6" luftbereift mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 47,5	2 St.
4g, 5c, 6, 7b	40 641 30	Lenkrad 140mm Vollgummi grau mit Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkrad 140mm Vollgummi grau mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 52,5	2 St.
4h, 5c, 6, 7b	40 641 35	Lenkrad 140mm Vollg. schwarz mit Lenkradgabel 45x145 kpl. Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz mit Lenkradgabel u. Distanzbuchse 52,5	2 St.
4a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi	2 St.
4b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi	2 St.
4c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi	2 St.
4d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift	2 St.
4e	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
4f	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
5a	40 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, schwarz (für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
5b	40 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, schwarz (für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
5c	40 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, schwarz (für Lenkrad 140mm)	2 St.
6	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.
7a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
7b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
7c	01 152 51	Linsenschraube M8x80 (für Gabel 60x145)	2 St.
8a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4" Vollgummi)	2 St.
8b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm)	2 St.
8c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4" und 5")	2 St.
8d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4" und 5" oder 6")	2 St.
8e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 14	50 642 20	Befestigung für Lenkradadapter kpl. Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	2 St.
9	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
10	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
12	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
13	50 642 34	Bolzen	2 St.
14	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Sonderräder für Lenkradgabel 5a oder 5b :

4g	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4h	05 201 43	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4i	05 201 65	Lenkrad 4" LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4j	05 201 66	Lenkrad 5" LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4k	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4l	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4m	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4n	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4o	05 203 14	Lenkrad 4" SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4p	05 203 15	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4q	05 203 64	Lenkrad 4" SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4r	05 203 65	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4s	05 203 05	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.
4t	05 203 06	Lenkrad 6" SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.


Lenkrad mit Schraubachse und Feststeller

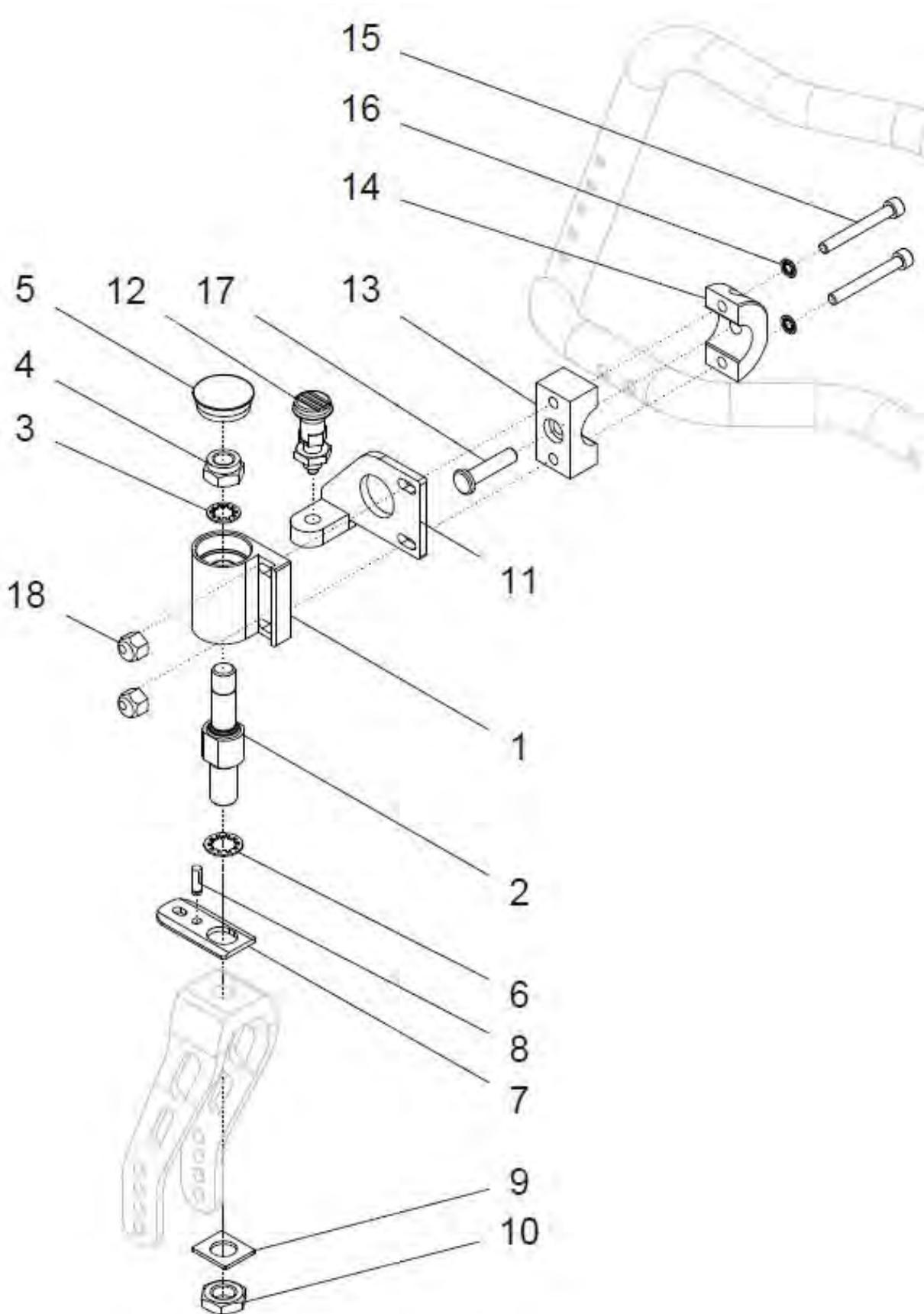

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	22 644 50	Lenkradadapter mit Feststeller (Paar) kpl. Lenkradadapter rechts und links mit Schraubachse lang und mit Platte und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)	1 Paar
1 - 4	22 644 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse lang kpl.	1 St.
1 - 4	22 644 32	Lenkradadapter links mit Schraubachse lang kpl.	1 St.
1	50 642 30	Lenkradadapter mit Lager	2 St.
2	50 642 52	Schraubachse lang (85mm)	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 12	2 St.
4	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985	2 St.
5	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
6	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
7	22 644 11	Arretierplatte	2 St.
8	01 411 50	Passkerbstift Ø5x6 - DIN 1472	2 St.
9	50 642 55	Distanzplatte Design-Lenkradgabel	2 St.
10	01 210 47	Mutter M14 - DIN 936	2 St.
11a	22 644 21	Platte mit Halter rechts	1 St.
11b	22 644 31	Platte mit Halter links	1 St.
12	01 133 03	Arretierbolzen mit Rast. Ø5mm schwarz und Kontermutter M10x1	2 St.
13 - 18	22 644 40	Befestigung für Lenkradadapter mit Schraubachse lang kpl. Klemmbogen mit Klemmpatte, Bolzen Exzentermuttern und langen Schrauben	2 St.
13	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
14	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
15	01 160 28	Zylinderschraube M6x50 - DIN 912	4 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
17	50 642 34	Bolzen	2 St.
18	50 642 35	Exzentermutter	4 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
2, 7 – 12, 15	22 644 00	<p>Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller (Paar) kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse. Schraubachse lang mit Platte rechts/links und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)</p> <p>Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!</p>	1 Paar
2, 7 – 11a, 12, 15	22 644 20	<p>Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller rechts kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse rechts. Schraubachse lang mit Platte rechts und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)</p> <p>Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!</p>	1 St.
2, 7 – 11b, 12, 15	22 644 30	<p>Umbausatz auf Lenkradadapter mit Feststeller links kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse links. Schraubachse lang mit Platte rechts und Rastbolzen und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)</p> <p>Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!</p>	1 St.


Lenkradadapter mit federndem Druckstück (Geradeauslauf / straight-keeper)

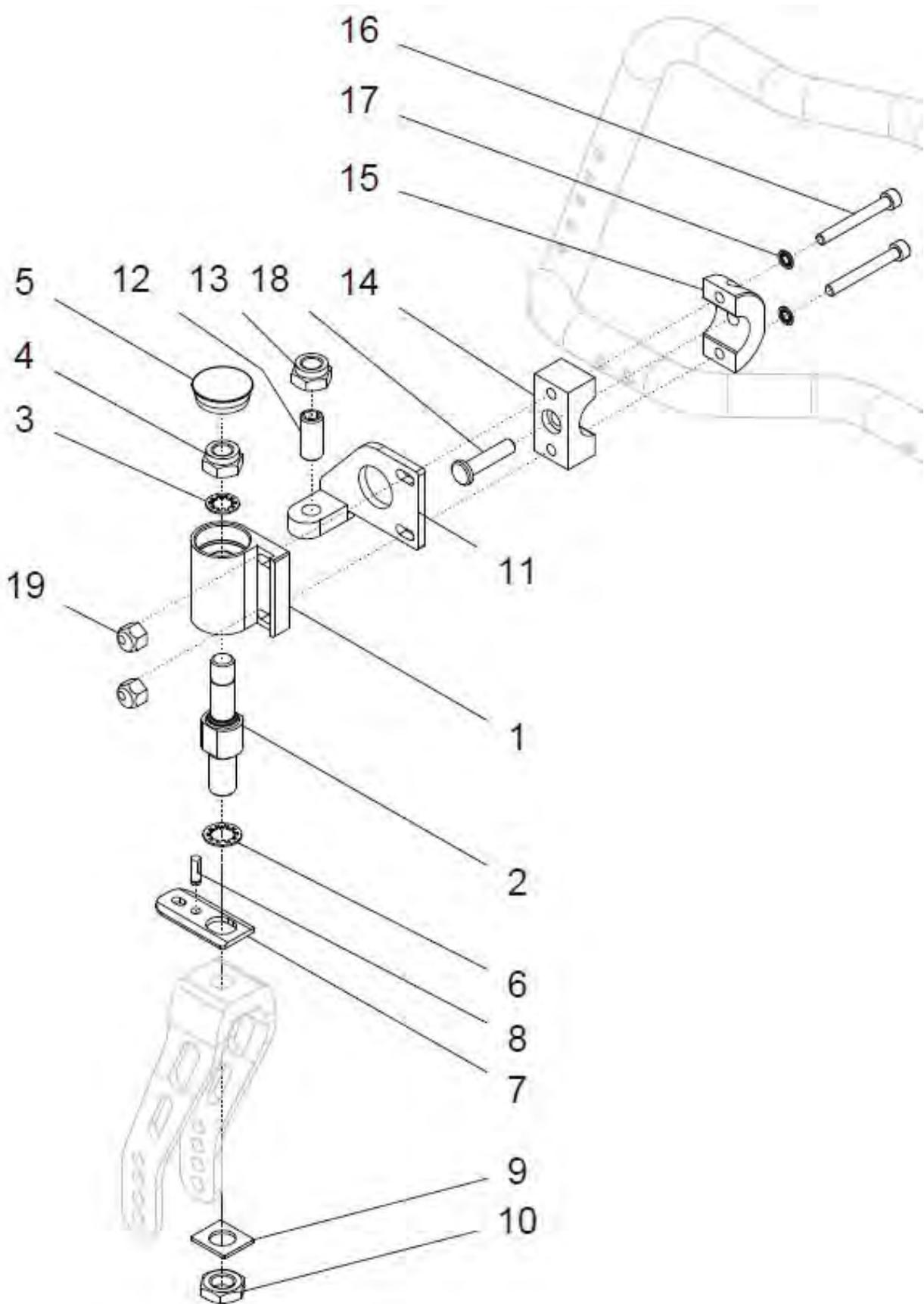

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 19	22 645 50	Lenkradadapter mit federndem Druckstück kpl. Lenkradadapter rechts und links mit Schraubachse lang und mit Platte und mit federndem Druckstück (straight-keeper) mit Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad)	1 Paar
1 - 4	22 644 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse lang kpl.	1 St.
1 - 4	22 644 32	Lenkradadapter links mit Schraubachse lang kpl.	1 St.
1	50 642 30	Lenkradadapter mit Lager	2 St.
2	50 642 52	Schraubachse lang (85mm)	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 12	2 St.
4	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985	2 St.
5	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
6	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
7	22 644 11	Arretierplatte	2 St.
8	01 411 50	Passkerbstift Ø5x6 - DIN 1472	2 St.
9	50 642 55	Distanzplatte Design-Lenkradgabel	2 St.
10	01 210 47	Mutter M14 - DIN 936	2 St.
11a	22 645 21	Platte mit Halter rechts für federndes Druckstück	1 St.
11b	22 645 31	Platte mit Halter links für federndes Druckstück	1 St.
12	01 132 19	Federndes Druckstück M12	2 St.
13	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985	2 St.
14 - 19	22 644 40	Befestigung für Lenkradadapter mit Schraubachse lang kpl. Klemmbogen mit Klemmpatte, Bolzen Exzentermuttern und langen Schrauben	2 St.
14	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
15	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
16	01 160 28	Zylinderschraube M6x50 - DIN 912	4 St.
17	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
18	50 642 34	Bolzen	2 St.
19	50 642 35	Exzentermutter	4 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
2, 7 - 13, 16	22 645 00	Umbausatz auf Lenkradadapter mit fed. Druckstück (Paar) kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse. Schraubachse lang mit Platte rechts/links und mit federndem Druckstück und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	1 Paar
2, 7 - 11a, 12 - 13, 16	22 645 02	Umbausatz auf Lenkradadapter mit fed. Druckstück rechts kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse rechts. Schraubachse lang mit Platte rechts und mit federndem Druckstück und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	1 St.
2, 7 - 11b, 12 - 13, 16	22 645 03	Umbausatz auf Lenkradadapter mit fed. Druckstück links kpl. Umbausatz für Lenkradadapter mit Schraubachse links. Schraubachse lang mit Platte links und mit federndem Druckstück und Befestigung für Lenkradadapter lang (ohne Lenkradgabel / ohne Lenkrad) Hinweis: die Schraubachse und die Zylinderschrauben müssen getauscht werden!!	1 St.

Lenkrad mit Steckachse

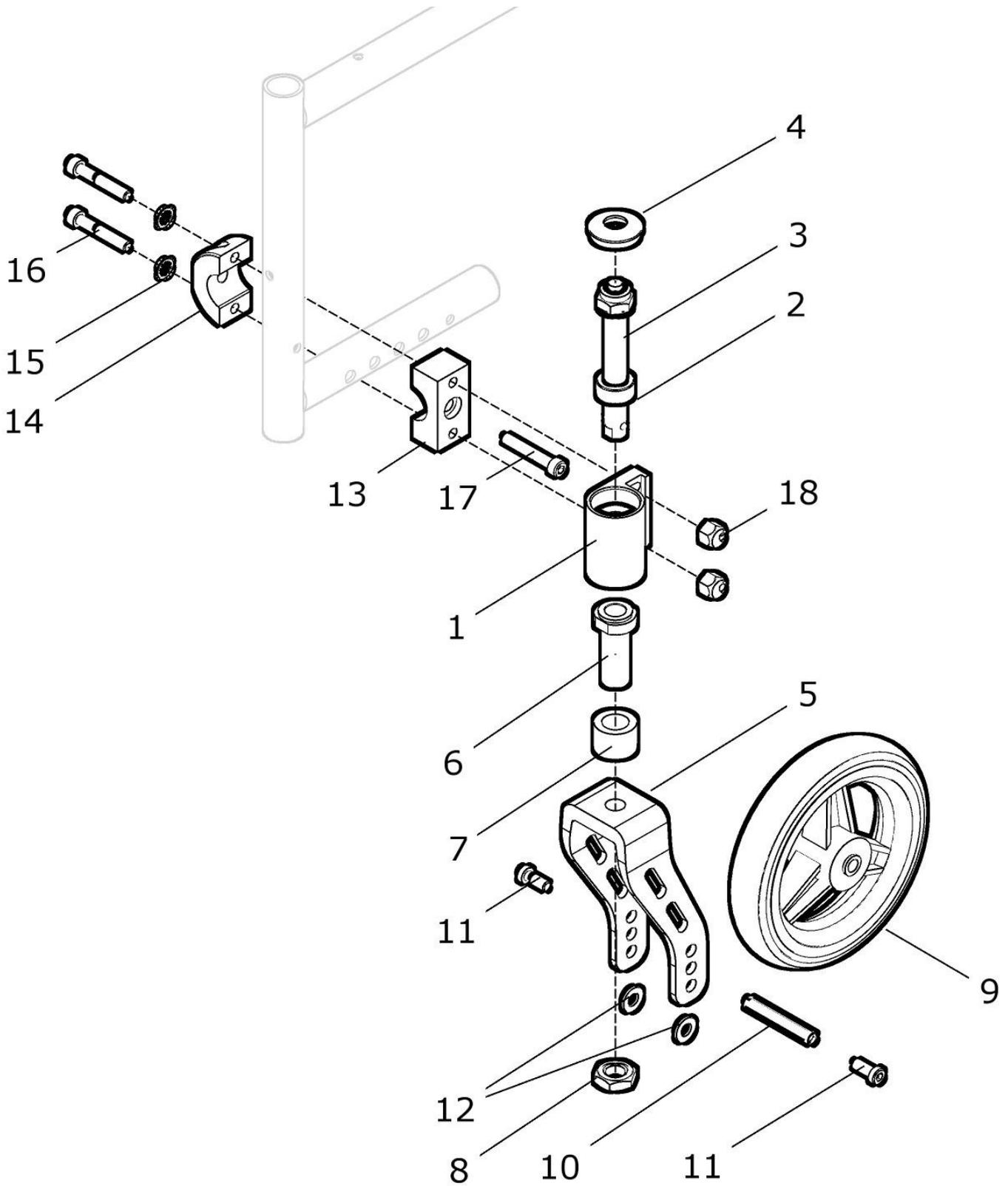


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18	40 640 61	Lenkradsatz 4“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 71	Lenkradsatz 4“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 62	Lenkradsatz 5“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 72	Lenkradsatz 5“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 63	Lenkradsatz 6“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 73	Lenkradsatz 6“ Vollg. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 64	Lenkradsatz 6“ luft. D.-Lenkradgabel 39x132 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 74	Lenkradsatz 6“ luft. D.-Lenkradgabel 39x170 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	40 640 80	Lenkradsatz 140mm Vollg. D.-L.gabel 45x145 / Steckachse kpl. Design-Lenkradgabeln 45x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	50 640 85	Lenkradsatz 7“ Vollg. Lenkradgabel 60x145 / Steckachse kpl. Lenkradgabeln 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 – 18	50 640 86	Lenkradsatz 7“ luft. Lenkradgabel 60x145 / Steckachse kpl. Lenkradgabeln 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm und Befestigung (Paar)	1 Paar
1 - 5a, 6 - 8	40 642 60	Design - Lenkradgabel 39x132 mit Adapter und Steckachse kpl. Design-Lenkradgabel 39x132 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm rechts und links verwendbar	2 St.

1 - 5b, 6 - 8	40 642 70	Design - Lenkradgabel 39x170 mit Adapter und Steckachse kpl. Design-Lenkradgabel 39x170 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm rechts und links verwendbar	2 St.
1 - 5c, 6 - 8	40 648 60	Design - Lenkradgabel 45x145 mit Adapter und Steckachse kpl. Design-Lenkradgabel 45x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm rechts und links verwendbar	2 St.
1 - 5d, 6 - 8	50 642 80	Lenkradgabel 60x145 mit Adapter und Steckachse kpl. Lenkradgabel 60x145 mit Adapter in Lenkradgabel und Steckachse 85mm rechts und links verwendbar	2 St.
1 - 4	50 641 20	Lenkradadapter mit Steckachse 85mm kpl. Und mit Distanzring und Abdeckkappe rechts und links verwendbar	2 St.
1	50 642 30	Lenkradadapter mit Lager (1/2")	2 St.
2	50 641 23	Distanzring 7,5mm	2 St.
3	50 642 69	Steckachse für Lenkradadapter 12,7mm, L=85mm	2 St.
4	50 642 68	Abdeckkappe mit Loch	2 St.
5a - 8	40 641 60	Design-Lenkradgabel 39x132 mit Steckachsenadapter kpl. mit Einschraubadapter und Buchse	1 St.
5b - 8	40 641 70	Design - Lenkradgabel 39x170 mit Steckachsenadapter kpl. mit Einschraubadapter und Buchse	1 St.
5c - 8	40 647 60	Design - Lenkradgabel 45x145 mit Steckachsenadapter kpl. mit Einschraubadapter und Buchse	1 St.
5d - 8	50 641 80	Lenkradgabel 60x145 mit Einschraubadapter kpl. mit Einschraubadapter und Buchse	1 St.
5a	40 642 61	Design-Lenkradgabel 39x132 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
5b	40 642 71	Design-Lenkradgabel 39x170 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
5c	40 648 61	Design-Lenkradgabel 45x145 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 140mm)	2 St.
5d	30 648 19	Lenkradgabel 60x145 für Steckachse, schwarz (für Lenkrad 7")	2 St.
6 - 8	50 642 61	Einschraubadapter mit 12mm Buchse kpl.	2 St.
6	01 195 01	Einschraubadapter 1/2" x 51mm	2 St.
7	80 621 06	Distanzscheibe 12mm	2 St.
8	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	2 St.
9a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi	2 St.
9b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi	2 St.
9c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi	2 St.
9d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift	2 St.
9e	05 201 05	Lenkrad 7" Vollgummi	2 St.

9f	05 202 02	Lenkrad 7" luftbereift	2 St.
9g	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
9h	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
10a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
10b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
10c	01 152 51	Linsenschraube M8x80 (für Gabel 60x145)	
11	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.
12a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4" Vollgummi)	2 St.
12b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi / 7")	2 St.
12c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4" und 5")	2 St.
12d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4" und 5" oder 6")	2 St.
12e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 18	50 642 20	Befestigung für Lenkradadapter kpl. Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	2 St.
13	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
14	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
16	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
17	50 642 34	Bolzen	2 St.
18	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Lenkradgabel gefedert

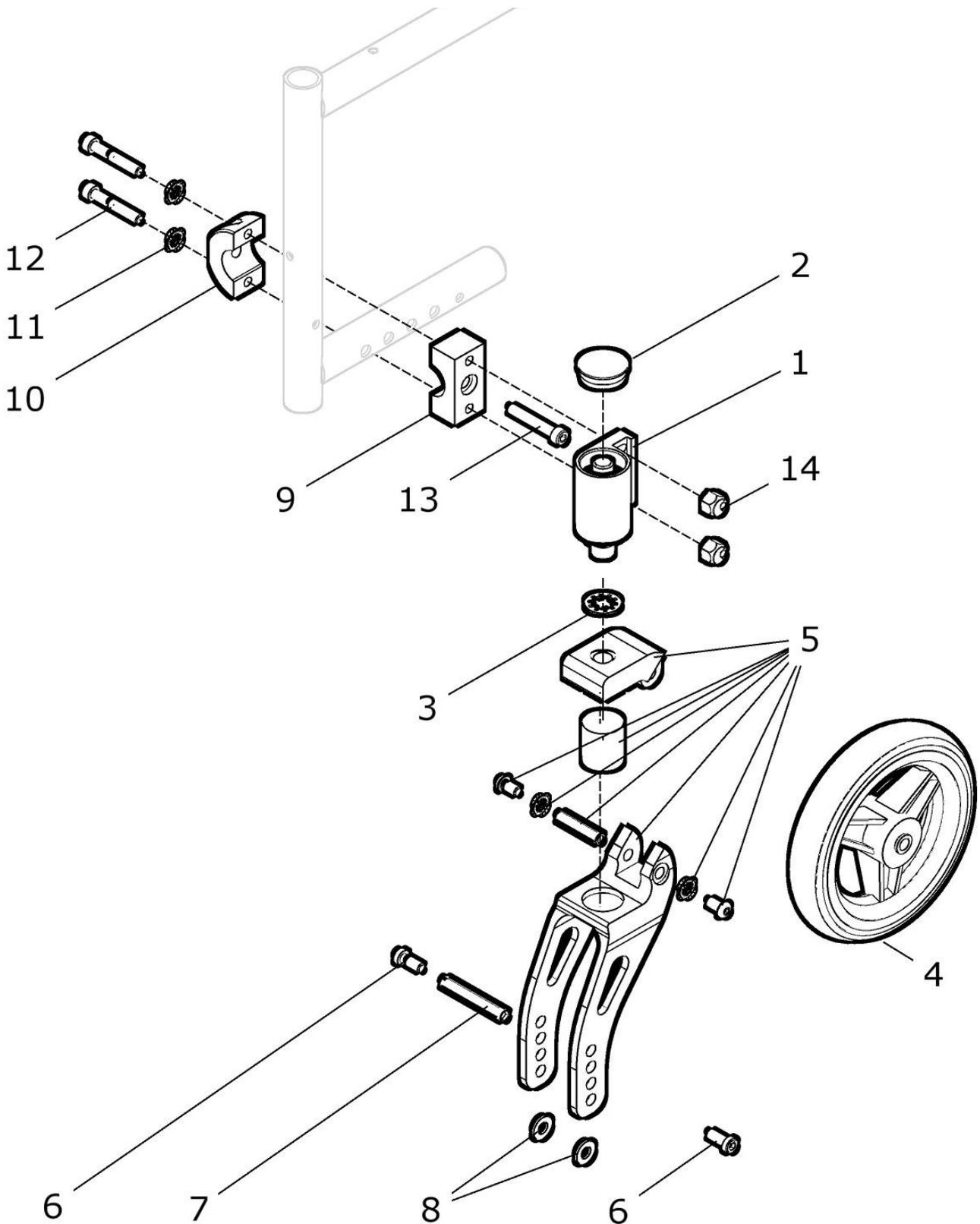

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4a, 5 - 14	50 650 01	Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4a, 5 - 14	50 650 21	Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4a, 5 - 14	50 650 31	Lenkradsatz 4“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4b, 5 - 14	50 650 02	Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4b, 5 - 14	50 650 22	Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4b, 5 - 14	50 650 32	Lenkradsatz 5“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4c, 5 - 14	50 650 03	Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4c, 5 - 14	50 650 23	Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4c, 5 - 14	50 650 33	Lenkradsatz 6“ Vollg., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4d, 5 - 14	50 650 04	Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4d, 5 - 14	50 650 24	Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 re. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4d, 5 - 14	50 650 34	Lenkradsatz 6“ luft., Lenkradgabel gefedert 39x170 li. kpl. Lenkradgabel gefedert 39x170 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.

1 – 4e, 5 – 14	50 650 05	Lenkradsatz 140mm Vollg. Lenkradg. gefedert 45x145 grau kpl. Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4e, 5 – 14	50 650 25	Lenkradsatz 140mm Vg. L-gabel gefedert 45x145 re. / grau kpl. Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4e, 5 – 14	50 650 35	Lenkradsatz 140mm Vg. L-gabel gefedert 45x145 li. / grau kpl. Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1 – 4f, 5 – 14	50 650 06	Lenkradsatz 140mm Vollg. L-gabel gefedert 45x145 schwarz kpl. Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (Paar) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 Paar
1a – 4f, 5 – 14	50 650 26	Lenkradsatz 140mm Vg. Gabel gefedert 45x145 re. / schwarz kpl Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (rechts) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1b – 4f, 5 – 14	50 650 36	Lenkradsatz 140mm Vg. Gabel gefedert 45x145 li. / schwarz kpl Lenkradgabel gefedert 45x145 und Lenkradadapter mit Schraubachse und Befestigung (links) Belastung bis: ? (bis 60 kg / bis 90 kg / bis 120 kg)	1 St.
1a	50 642 22	Lenkradadapter rechts mit Schraubachse	1 St.
1b	50 642 23	Lenkradadapter links mit Schraubachse	1 St.
2	04 201 81	Abdeckkappe	2 St.
3	01 330 05	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 14	2 St.
4a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi	2 St.
4b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi	2 St.
4c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi	2 St.
4d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift	2 St.
4e	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
4f	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.
5a	50 652 11	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz bis 60kg (60SH)	2 St.
5b	50 652 12	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz 60 bis 90kg (70SH)	2 St.
5c	50 652 13	Lenkradgabel gefedert 39x170, schwarz 90 bis 120kg (80SH)	2 St.
5d	50 652 21	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz bis 60kg (60SH)	2 St.
5e	50 652 22	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz 60 bis 90kg (70SH)	2 St.
5f	50 652 23	Lenkradgabel gefedert 45x154, schwarz 90 bis 120kg (80SH)	2 St.
6	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.


7a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132 / 39x170)	2 St.
7b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
8a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 (bei Lenkrad 4" Vollgummi)	2 St.
8b	--	keine Scheibe (bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi)	2 St.
8c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5mm (bei Lenkrad LED 4" und 5")	2 St.
8d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 4" und 5")	2 St.
8e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	2 St.
9 - 14	50 642 20	Befestigung für Lenkradadapter kpl. Klemmplatte mit Klemmbogen, Bolzen, Exzentermutter und Schrauben	2 St.
9	50 642 32	Klemmplatte außen	2 St.
10	50 642 33	Klemmbogen innen	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
12	01 160 27	Zylinderschraube M6x45 - DN 912	4 St.
13	50 642 34	Bolzen	2 St.
14	50 642 35	Exzentermutter M6	4 St.

Sonderräder für Lenkradgabel gefedert 39x170:


4g	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4g	05 201 43	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
4i	05 201 65	Lenkrad 4" LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4j	05 201 66	Lenkrad 5" LED Lightwheel (Skater)	2 St.
4k	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4l	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4m	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4n	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4o	05 203 14	Lenkrad 4" SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4p	05 203 15	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
4q	05 203 64	Lenkrad 4" SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4r	05 203 65	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
4s	05 203 05	Lenkrad 5" SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.
4t	05 203 06	Lenkrad 6" SOFT-Vollg., Kunststoff-Felge schwarz / Bereifung schwarz	2 St.

Bremse

Gruppe 7

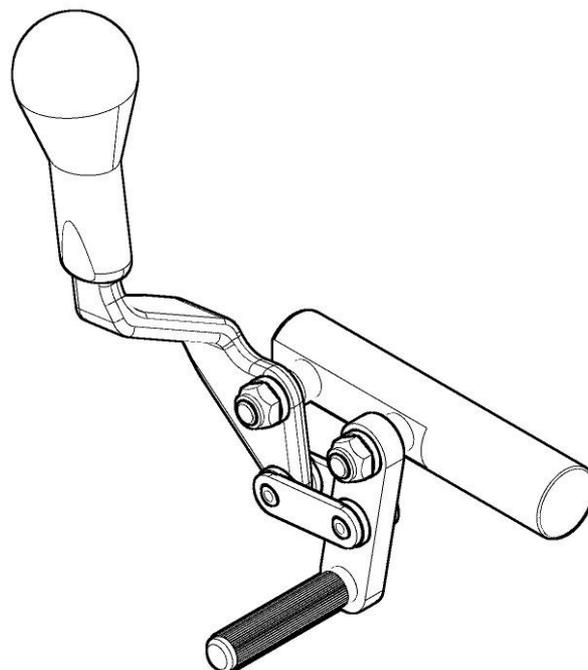


Kniehebelbremse abgekröpft

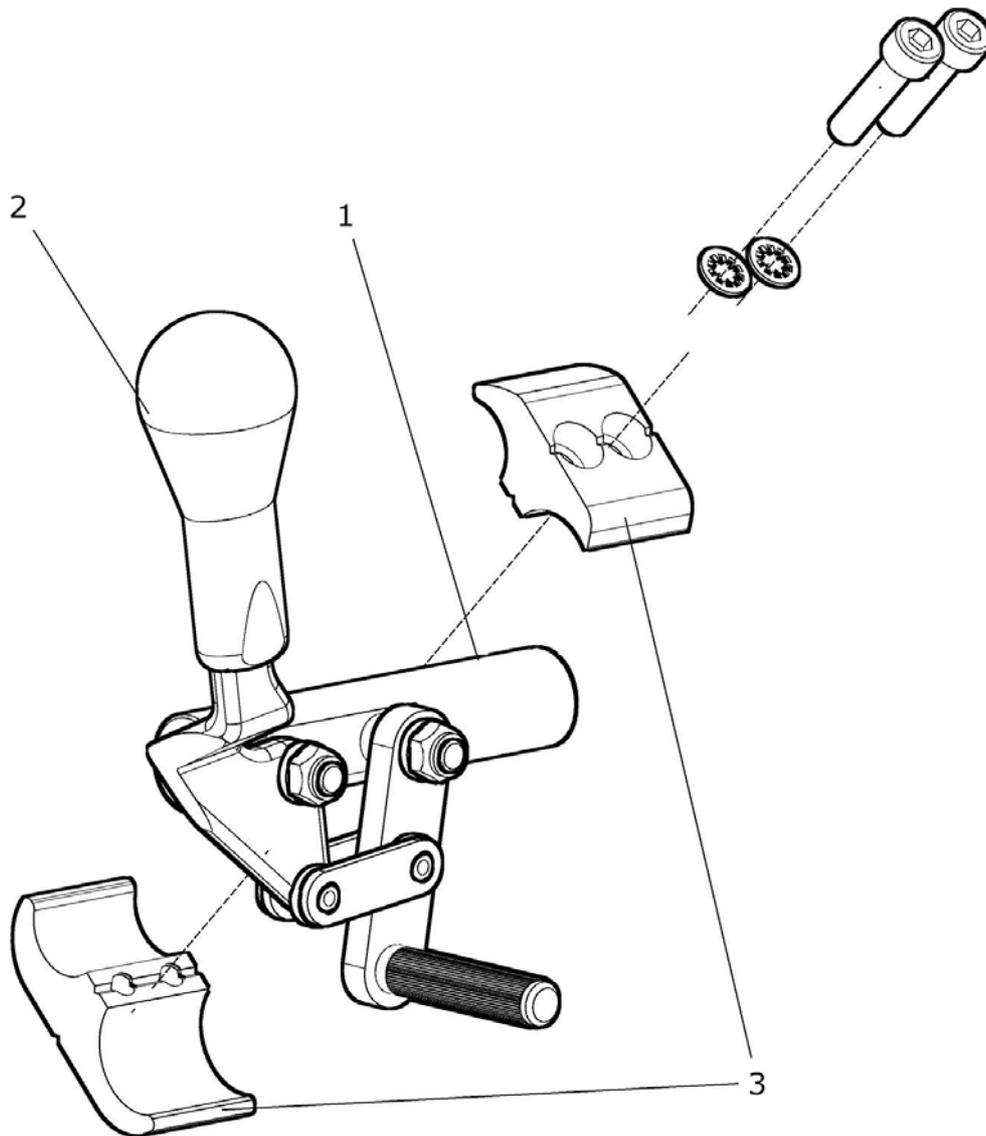

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	50 740 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (Paar) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 3	50 742 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (rechts) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 3	50 743 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (links) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 St.
1a – 2	25 722 01	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b – 2	25 723 01	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.


Kniehebelbremse mit Verlängerung abklappbar

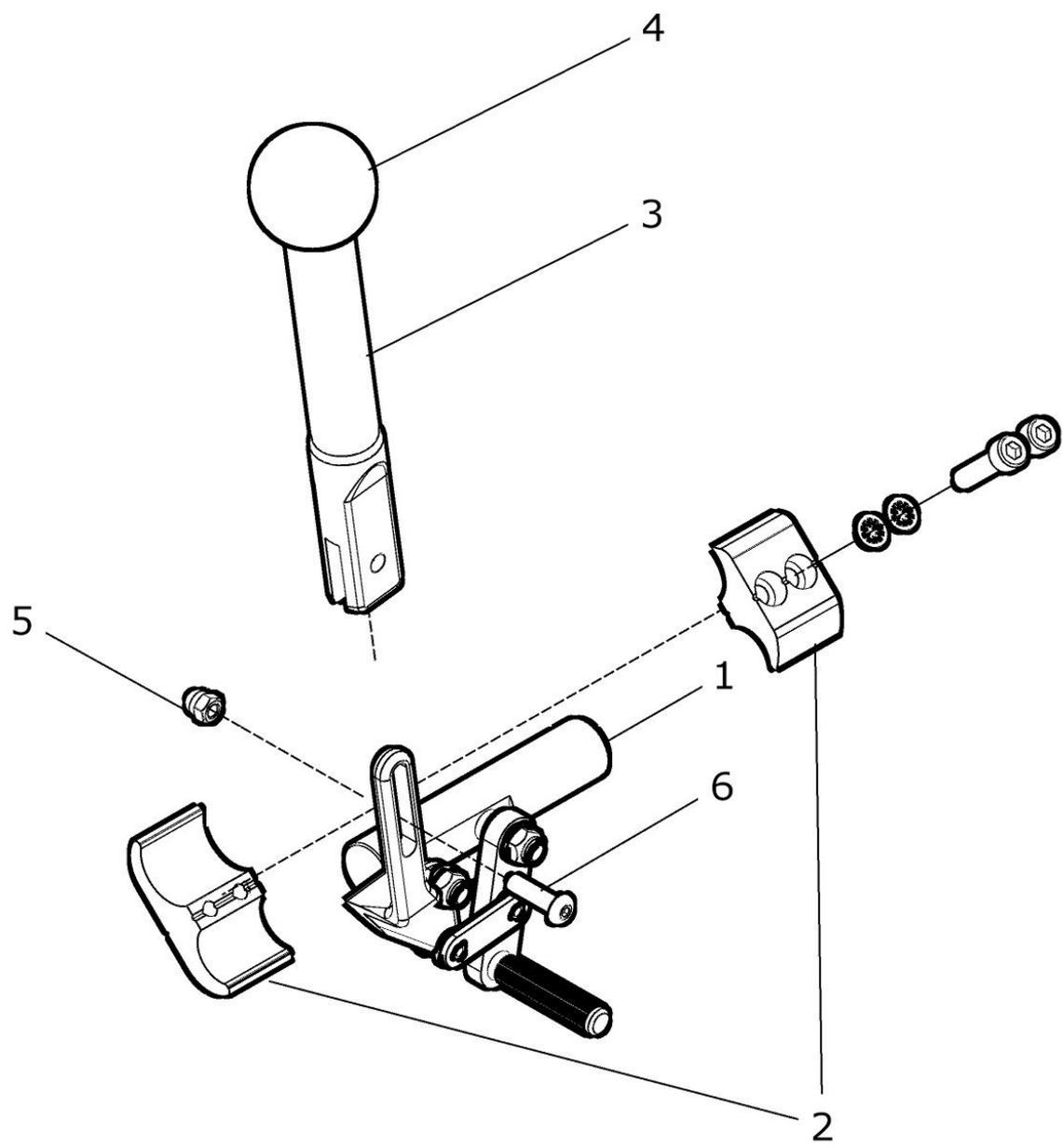

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 750 00	Kniehebelbremse abgekröpft mit Verläng. abklappbar Paar kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 6	50 752 00	Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. abklappbar rechts kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 6	50 753 00	Kniehebelbremse abgekröpft mit Verlg. abklappbar links kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1a	50 752 01	Kniehebelbremse abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	50 753 01	Kniehebelbremse abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3 – 6	50 751 00	Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.	2 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	25 730 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Verlg. abklappb. Paar kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 6	25 732 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. rechts kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 6	25 733 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. links kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3 – 6	50 751 00	Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.	2 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.

Betätigung Trommelbremse (für Begleitperson)

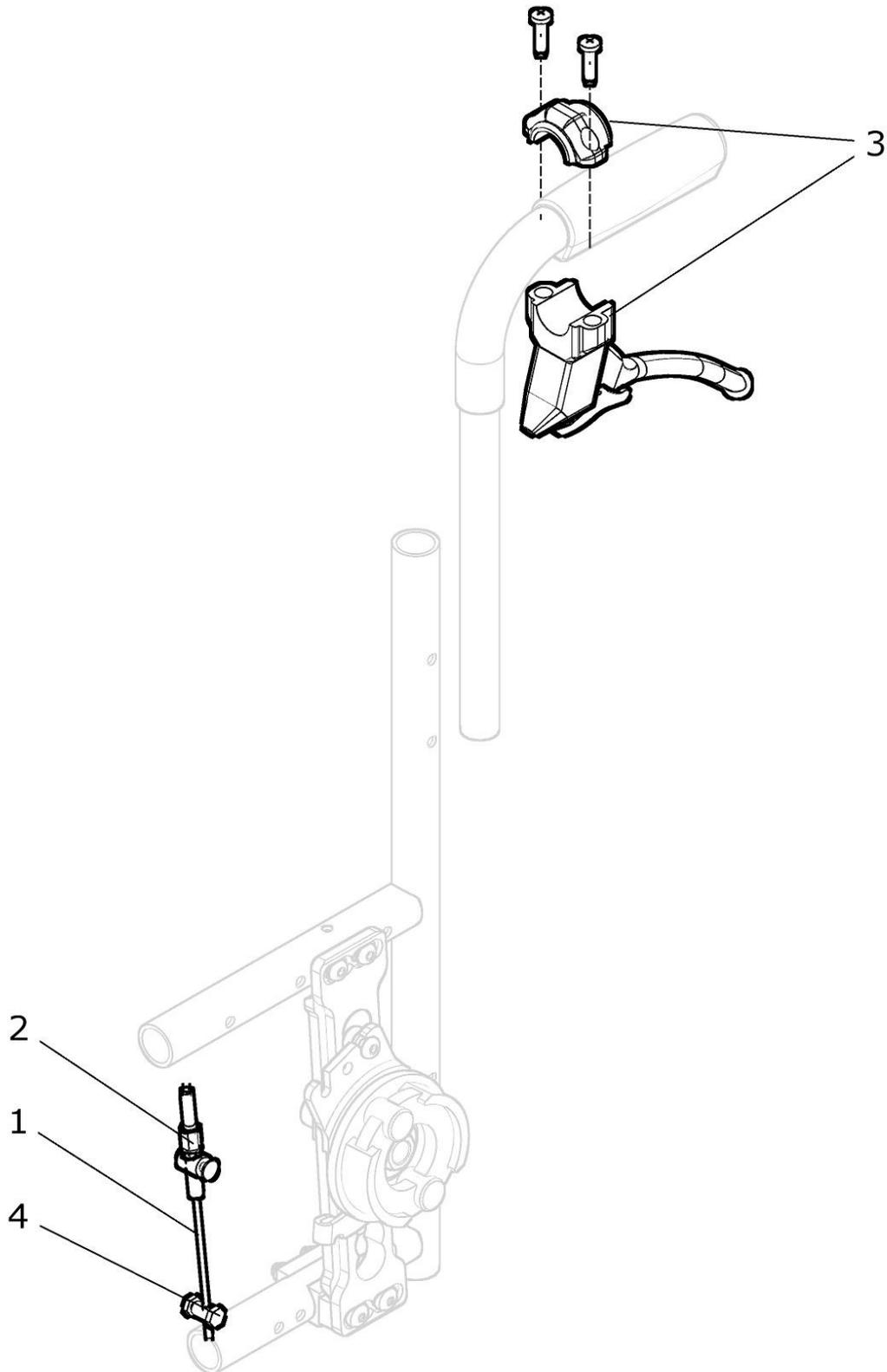


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	50 730 00	Betätigung für Trommelbremse kpl. Bremsgriff mit Bowdenzug, Einstellautomatik und Klemmnippel RH: ? Schiebegriff höhenverstellbar: ?	2 St.
1a	50 731 01	Bowdenzug 650 / 790 für Trommelbremse (RH 20-35 standard / RH 20 -30 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1b	50 731 11	Bowdenzug 880 / 1020 für Trommelbremse (RH 40 - 55 standard / RH 35 - 50 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1c	50 731 21	Bowdenzug 1050/1190 für Trommelbremse (RH 50 - 55 Schgr. höhenv. 15cm und für Schgr. lang / extra lang)	2 St.
2	05 402 00	Einstellautomatik für Bowdenzug kpl.	2 St.
3	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
4	05 402 20	Klemmnippel	2 St.

Einhandbremse

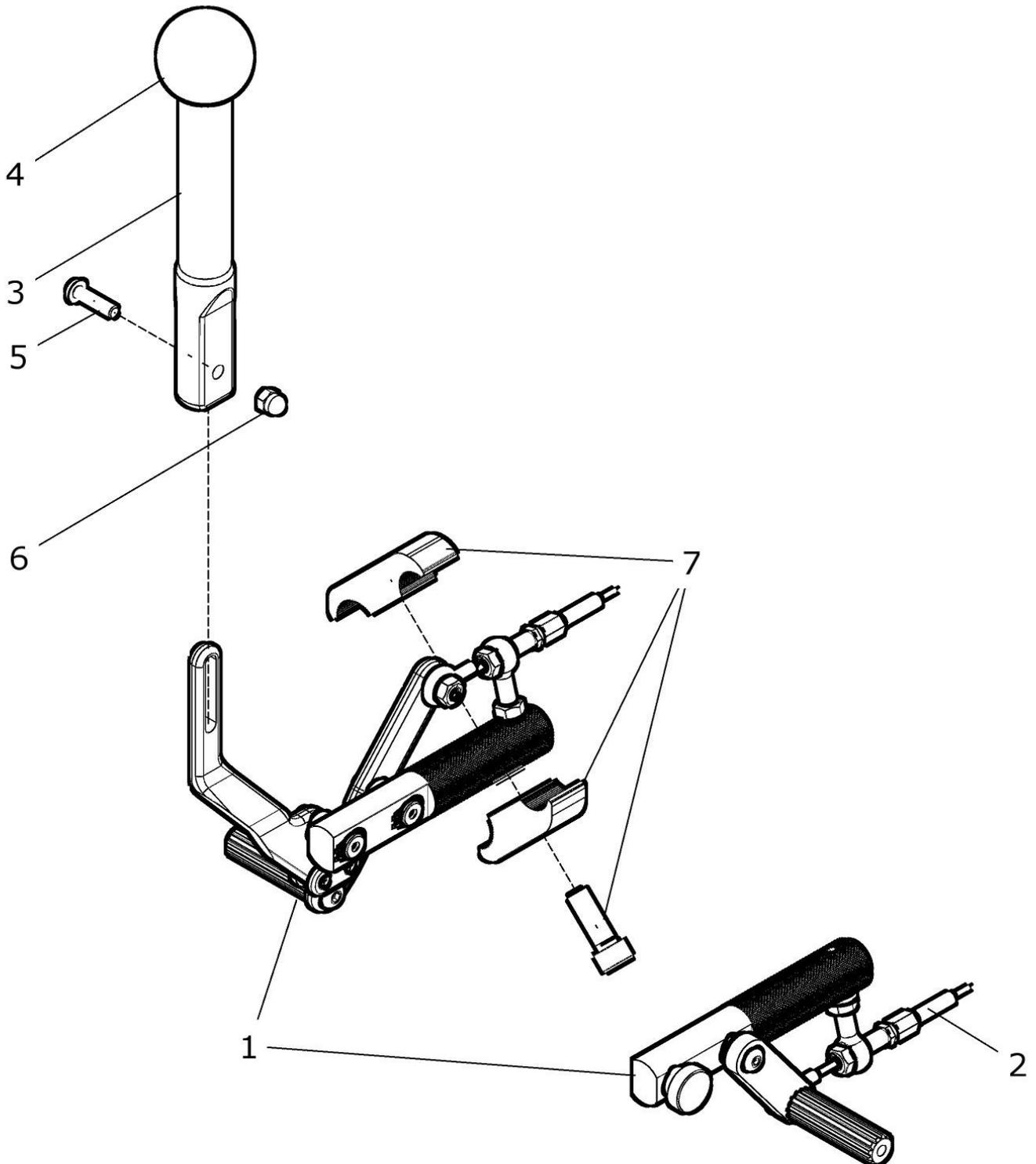


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	25 750 20	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1c - 7	25 750 60	Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz rechts betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	1 St.
1a - 2	25 750 21	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt mit Bowdenzug standard	1 St.
1c - 2	25 750 61	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt (140mm Bolzen) mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	1 St.
2a	50 721 30	Bowdenzug kurz für Einhandbremse (bis SB 50cm) / standard	1 St.
2b	50 721 40	Bowdenzug lang für Einhandbremse (ab SB 52cm)	1 St.
3 - 6	50 751 00	Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.	1 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	1 St.
4	01 251 21	Kugel	1 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	1 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	1 St.
7a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
7b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
7c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
7d	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl. (Typ D) standard	1 Paar
1b - 7	25 750 30	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1d - 7	25 750 70	Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz links betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	1 St.
1b - 2	25 750 31	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt mit Bowdenzug standard	1 St.
1d - 2	25 750 71	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt (140mm Bolzen) mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	1 St.


Montage - Hinweis Einhandbremse

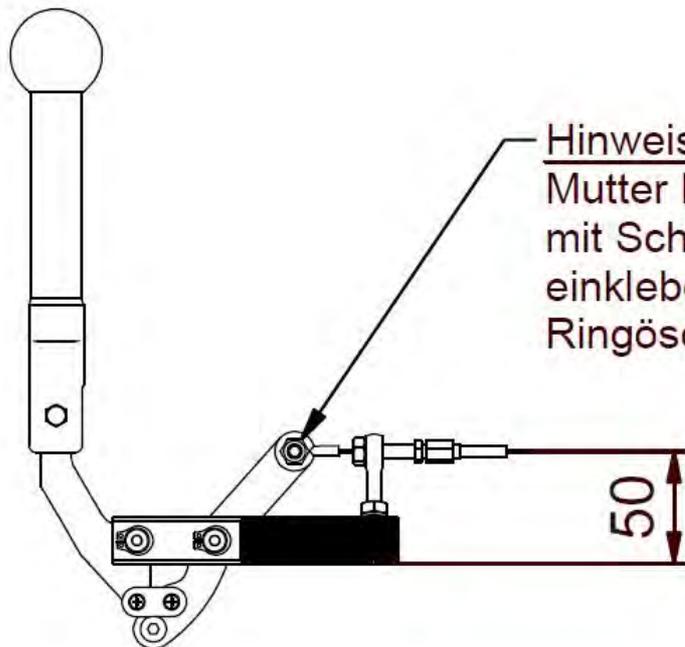

Hinweis:
Mutter M5 zur Befestigung der Ringöse
mit Schraubensicherung -mittelfest-
einkleben und so montieren, daß die
Ringöse noch frei beweglich ist !

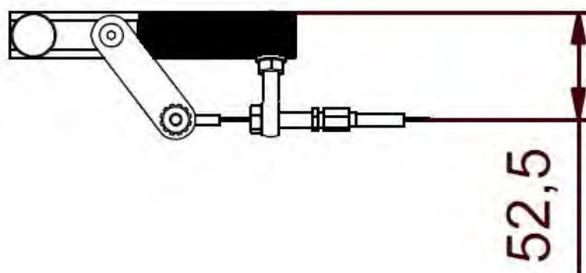


Druckbremse für Begleitperson (= zusätzliche Kniehebelbremse für Begleitperson)

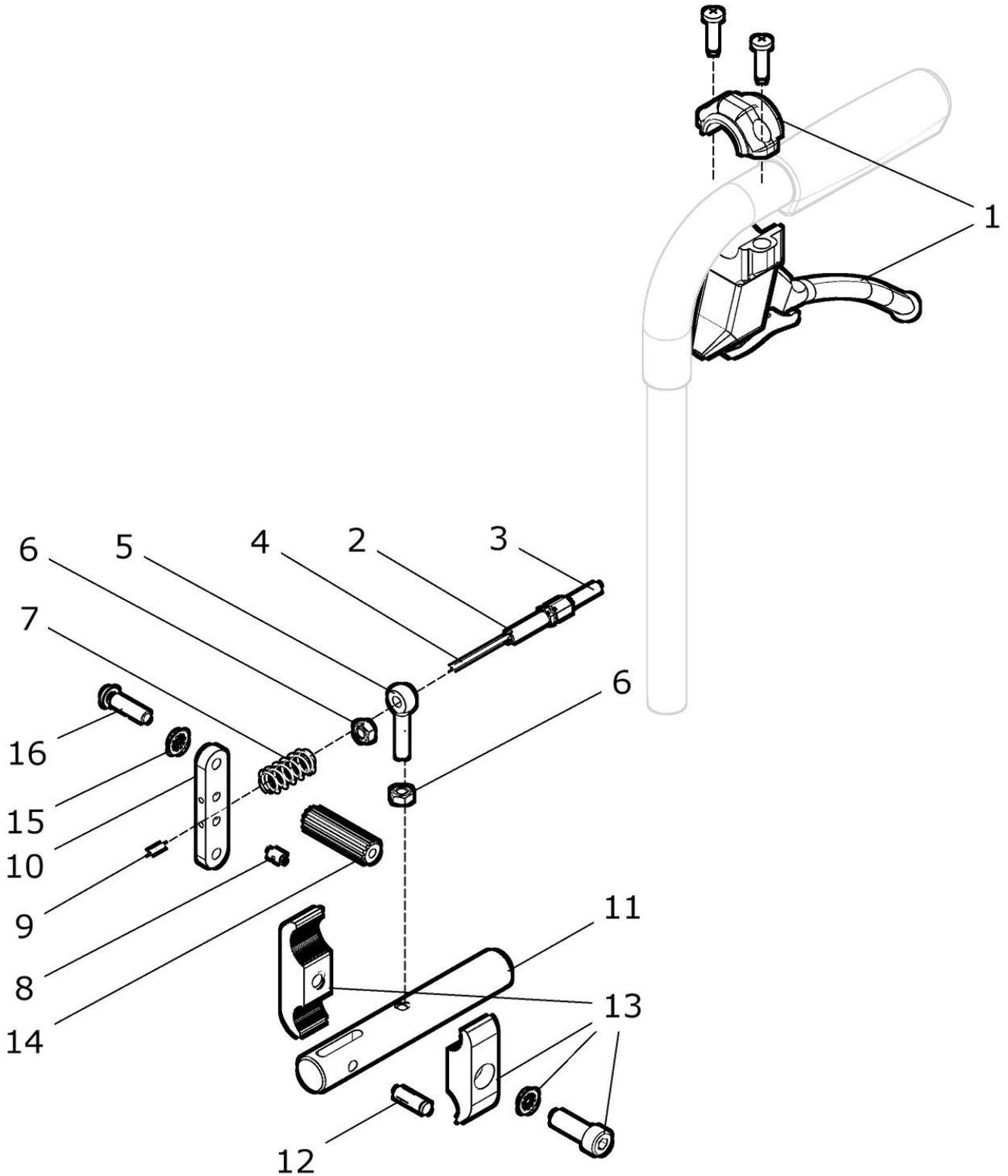

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	22 750 00	Druckbremse für Begleitperson kpl. Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 Paar
1 - 16	22 752 00	Druckbremse für Begleitperson rechts kpl. Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten rechts am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 16	22 753 00	Druckbremse für Begleitperson links kpl. Bremse angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten links am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 9	22 751 00	Bowdenzug Druckbremse mit Bremsgriff Begleitperson kpl. Bowdenzug mit Bremsgriff und mit Einstellautomatik, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
2 - 4	22 751 05	Bowdenzug für Druckbremse kpl.	2 St.
2	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
3	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
5	01 180 02	Augenschraube B M6x25 - DIN 444	2 St.
6	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	4 St.
7	02 110 09	Druckfeder	2 St.
8	05 402 28	S-Nippel	2 St.
9	05 402 72	Adernendhülse L=10mm	2 St.
10 - 16	22 752 10	Druckbremse unten am Rahmen rechts kpl. (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
10 - 16	22 753 10	Druckbremse unten am Rahmen links kpl. (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.

10	25 741 32	Stegbolzen		2 St.
11a	25 741 61	Gabelbolzen lang gerade (=standard)	(meistens SPRINT / SLADE)	2 St.
11b	25 741 41	Gabelbolzen 20° abgekröpft 25mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11c	25 741 46	Gabelbolzen 20° abgekröpft 45mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11d	25 741 31	Gabelbolzen gerade	(meistens FILOU)	2 St.
12	01 411 72	Knebelkerbstift Ø6x20 - DIN 1475		2 St.
13a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl.	(Typ C)	2 St.
13b	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl.	(Typ D)	1 Paar
14a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)		2 St:
14b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm		2 St:
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6		2 St.
16	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380		2 St.


Kniehebelbremse angesteuert mit Bowdenzug für Begleitperson

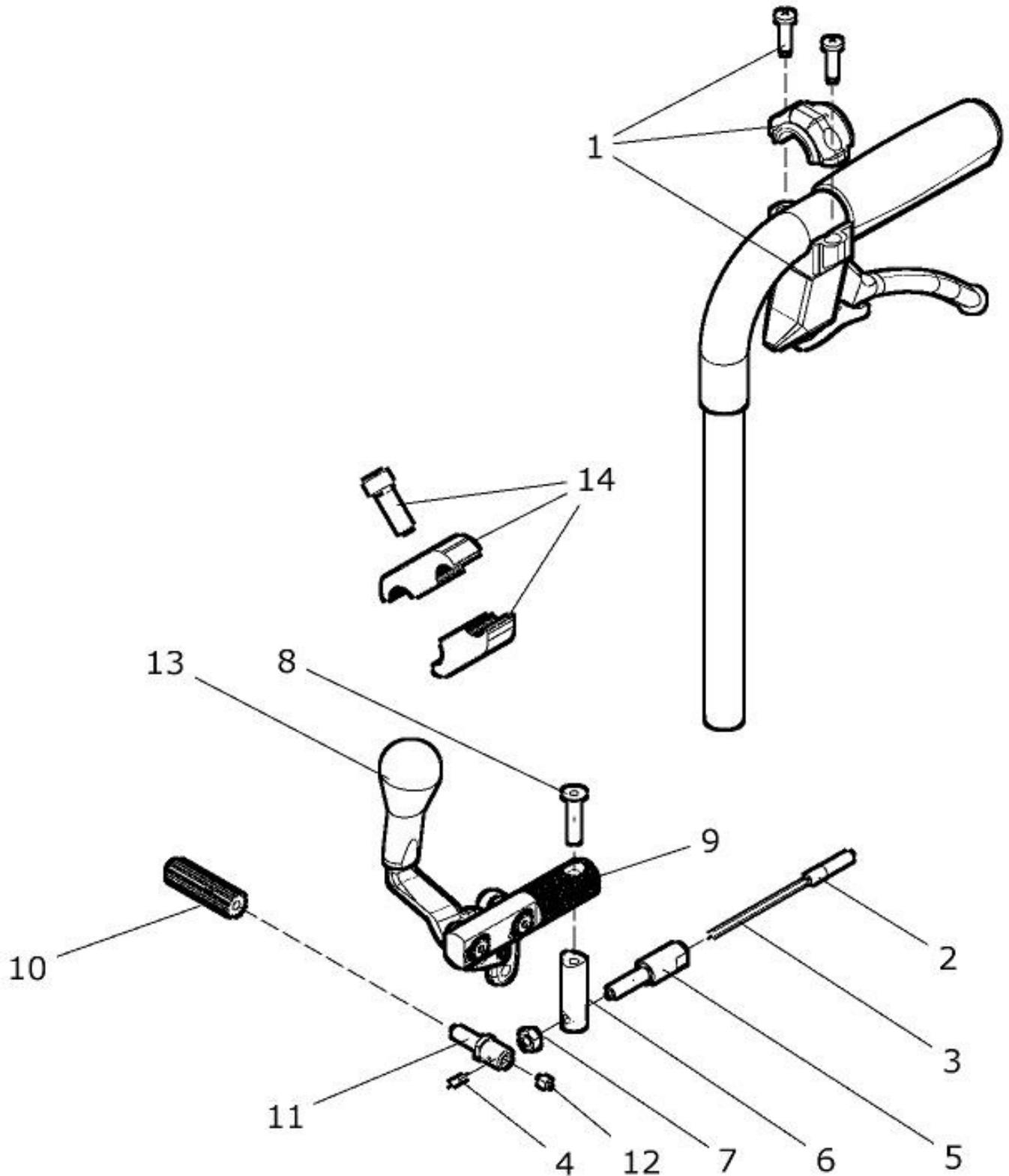

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	22 740 00	Kniehebelbremse abgekr. mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft kurz angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1 - 9a, 10 - 14	22 742 00	Kniehebelbremse rechts mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft rechts angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 - 9b, 10 - 14	22 743 00	Kniehebelbremse links mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft links angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 - 8	22 741 10	Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl. Bowdenzug mit Bremsgriff MAG und mit Gewindehülse, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1 - 4	22 741 40	Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse	2 St.
1	22 741 45	Bremsgriff MAG mit Gewinde M5	2 St.
2 - 4	22 741 30	Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl. Die Bowdenzughülle und der Innenzug wird beim Einbau entsprechend gekürzt	2 St.
2	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
3	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 402 72	Aderendhülse L=10mm	2 St.
5	22 741 21	Gewindehülse M6 für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
6	22 741 61	Distanzbolzen für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
7	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	2 St.
8	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
9a - 12	22 742 10	Kniehebelbremse kurz rechts mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl. ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9b - 12	22 743 10	Kniehebelbremse kurz links mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl. ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9a	22 742 11	Kniehebelbremse kurz rechts für Bowdenzug / ohne Andruckbolzen Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.


9b	22 743 11	Kniehebelbremse kurz links für Bowdenzug Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.
10a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)	2 St.
10b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm	2 St.
11	22 751 11	Gewindebolzen M6 / M5	2 St.
12	01 131 01	Gewindestift M5x6 - DIN 913	2 St.
13	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
14	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse „ Pull to lock “

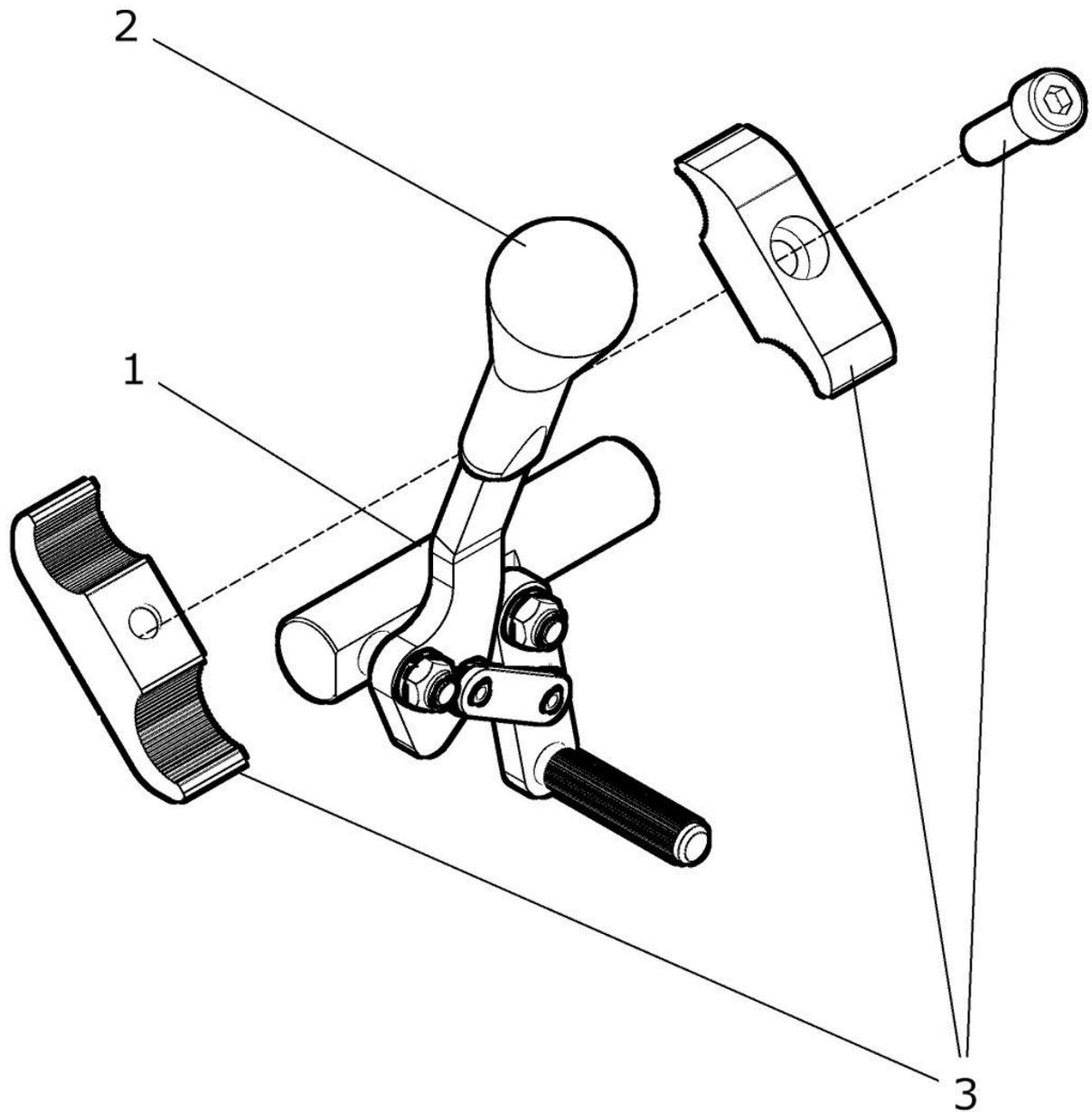

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung			Menge
1 – 3	50 760 00	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	(Paar)	kpl.	1 Paar
1a – 3	50 760 20	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	rechts	kpl.	1 St.
1b – 3	50 760 30	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	links	kpl.	1 St.
1a, 2	50 762 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	rechts		1 St.
1b, 2	50 763 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	links		1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval			2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz	kpl.	(Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang	kpl.	(Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal	kpl.	(Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse mit Distanzbolzen bei Big Apple- / Standard-Bereifung schräg / abgekröpft

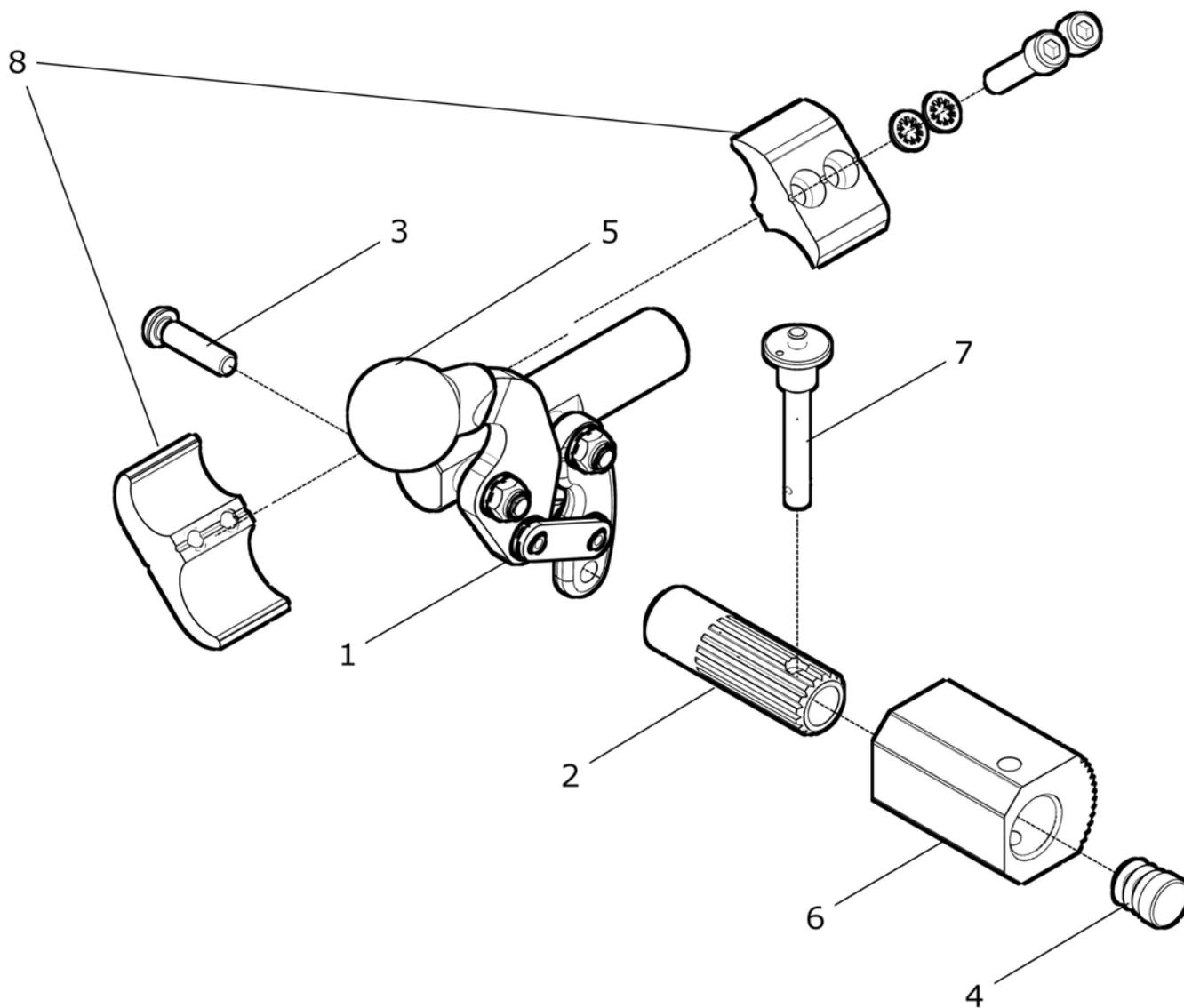

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 8	50 745 00	Kniehebelbremse abgekröpft kurz mit Distanzbolzen kpl. Kniehebelbremse abgekröpft kurz mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	1 Paar
1c, 1d, 2 – 8	50 745 06	Kniehebelbremse abgekröpft mit Distanzbolzen kpl. Kniehebelbremse abgekröpft mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	1 Paar
1e, 1f, 2 – 8	50 745 08	Kniehebelbremse schräg mit Distanzbolzen kpl. Kniehebelbremse schräg mit Andruckbolzen und Distanzbolzen und Bremshalter Distanzbolzen: ? (22,5 oder 26) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ? Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 5	50 745 22	Kniehebelbremse abgekröpft kurz rechts mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1b – 5	50 745 23	Kniehebelbremse abgekröpft kurz links mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1c – 5	50 745 62	Kniehebelbremse abgekröpft rechts mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1d – 5	50 745 63	Kniehebelbremse abgekröpft links mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1e – 5	50 745 82	Kniehebelbremse schräg rechts mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1f – 5	50 745 83	Kniehebelbremse schräg links mit Andruckbolzen lang Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1a	25 722 09	Kniehebelbremse abgekröpft kurz rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1b	25 723 09	Kniehebelbremse abgekröpft kurz links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1c	50 742 59	Kniehebelbremse abgekröpft rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1d	50 743 59	Kniehebelbremse abgekröpft links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1e	50 742 09	Kniehebelbremse schräg rechts (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
1f	50 743 09	Kniehebelbremse schräg links (ohne Andruckbolzen) Befestigungsbolzen: standard / umgedreht ?	1 St.
2	50 745 11	Andruckbolzen lang (für Bremse BIG APPLE / standard)	2 St.

3	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
4	04 210 11	Verschlußstopfen D15x1 schwarz	2 St.
5	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
6a	50 745 12	Distanzbolzen 22,5 für Andruckbolzen lang (Abstand 22,5mm) Beim Wechsel von BIG APPLE mit Normalbereifung 1 3/8"	2 St.
6b	50 745 15	Distanzbolzen 26 für Andruckbolzen lang (Abstand 26mm) Beim Wechsel von BIG APPLE mit Leichtlaufbereifung 1"	2 St.
7	05 450 91	Quickpin Kugelsperrbolzen Ø6,2 x 33	2 St.
8a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
8b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
8c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
2 - 4, 6 - 7	50 745 10	Umbausatz für Kniehebelbremse auf Distanzbolzen kpl. Andruckbolzen lang mit Bohrung und mit Distanzbolzen und Quickpin Ø6,2x33 (für Kniehebelbremse schräg, abgekröpft und abgekröpft kurz)	2 St.