

Ersatzteilkatalog

Little



VD 931 – 08 / 2020

Berollka-aktiv
Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstrasse 16
D-74889 Sinsheim

Tel.:07261 – 7351 - 0
Fax:07261 – 7351 - 10
info@berollka.de
www.berollka.de



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2020 Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

Ersatzteilkatalog

Kinder-/Jugend-Aktivrollstuhl

Little AR / SLT

Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellstmöglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle Berollka-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.

Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Produkt oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe.

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `FM:..?.` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code, bei `FB:..?.` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `A...`, `B...` und `C...` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Produkt).

Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Produkt, sowie Kundenvereinbarungen, die die instandsetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.


Ihr **Berollka[®]-aktiv** Team



Baugruppenübersicht

Alle unsere Produkte bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Produkt ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.

Zum Beispiel gehören die Greifringe zur Baugruppe RAD (= Gruppe 6).

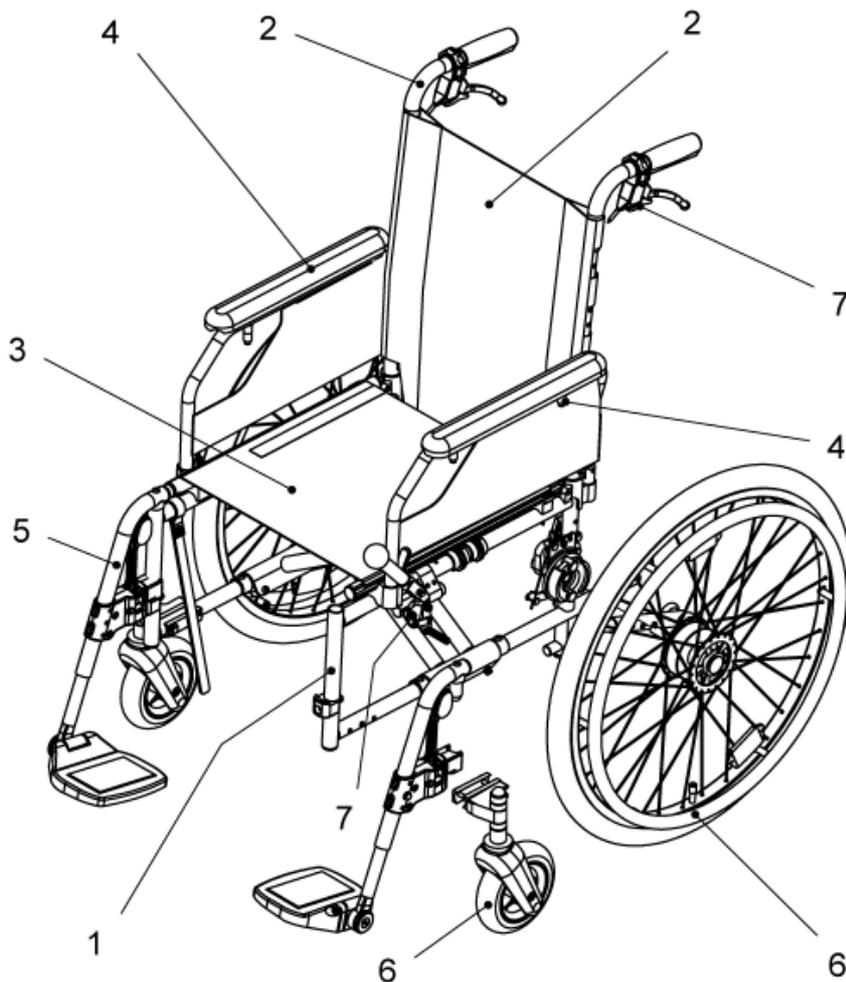

Baugruppen:

Rahmen	Gruppe 1	Fußbrett	Gruppe 5
Rücken	Gruppe 2	Rad	Gruppe 6
Sitz und Kreuzstrebe	Gruppe 3	Bremse	Gruppe 7
Seitenteil	Gruppe 4		

Abkürzungen:

SB = Sitzbreite

ST = Sitztiefe

RH = Rückenhöhe

FM = Farbe der Metallteile

FB = Farbe der Bespannung

o. Bild = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.
(Download ist auf unserer Homepage www.berollka.de möglich)

Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für Berollka-aktiv Rollstühle. Diese können die Betriebssicherheit des Produktes erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

Berollka-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.

Berollka-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- ◆ Beim Austausch von Teilen nur die für diese Produkte vorgesehenen Bauteile verwenden.
- ◆ Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- ◆ Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Produkt durchführen.
- ◆ Führen Sie nach der Reparatur des Produkts eine Funktionsprüfung durch.
- ◆ Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Produktes dem Patienten übergeben.

Anzugsdrehmomente Schrauben:


- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm
- M16 (Mutter Bremsträger/Steckachsenadapter) = 30Nm
- M20 (Mutter Adapter Steckachse FINDUS) = 30Nm


Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben



Rahmen


Gruppe 1

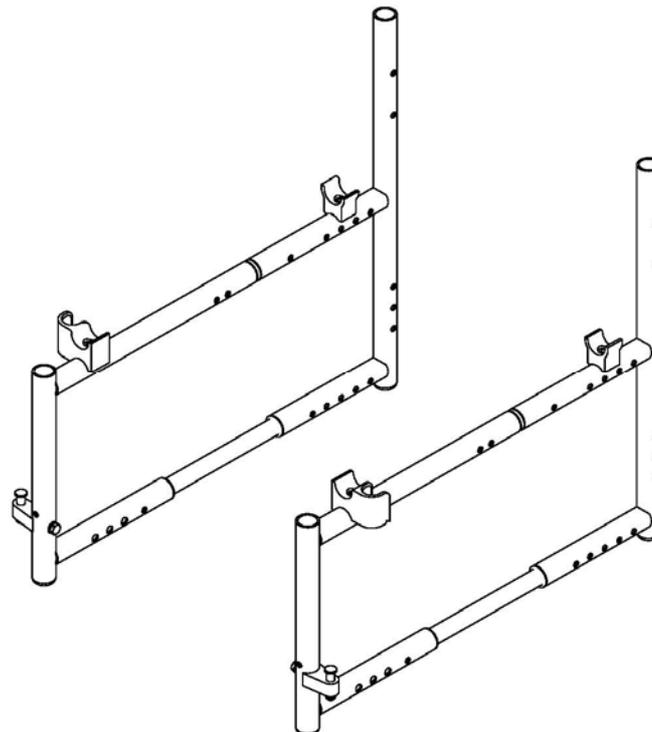

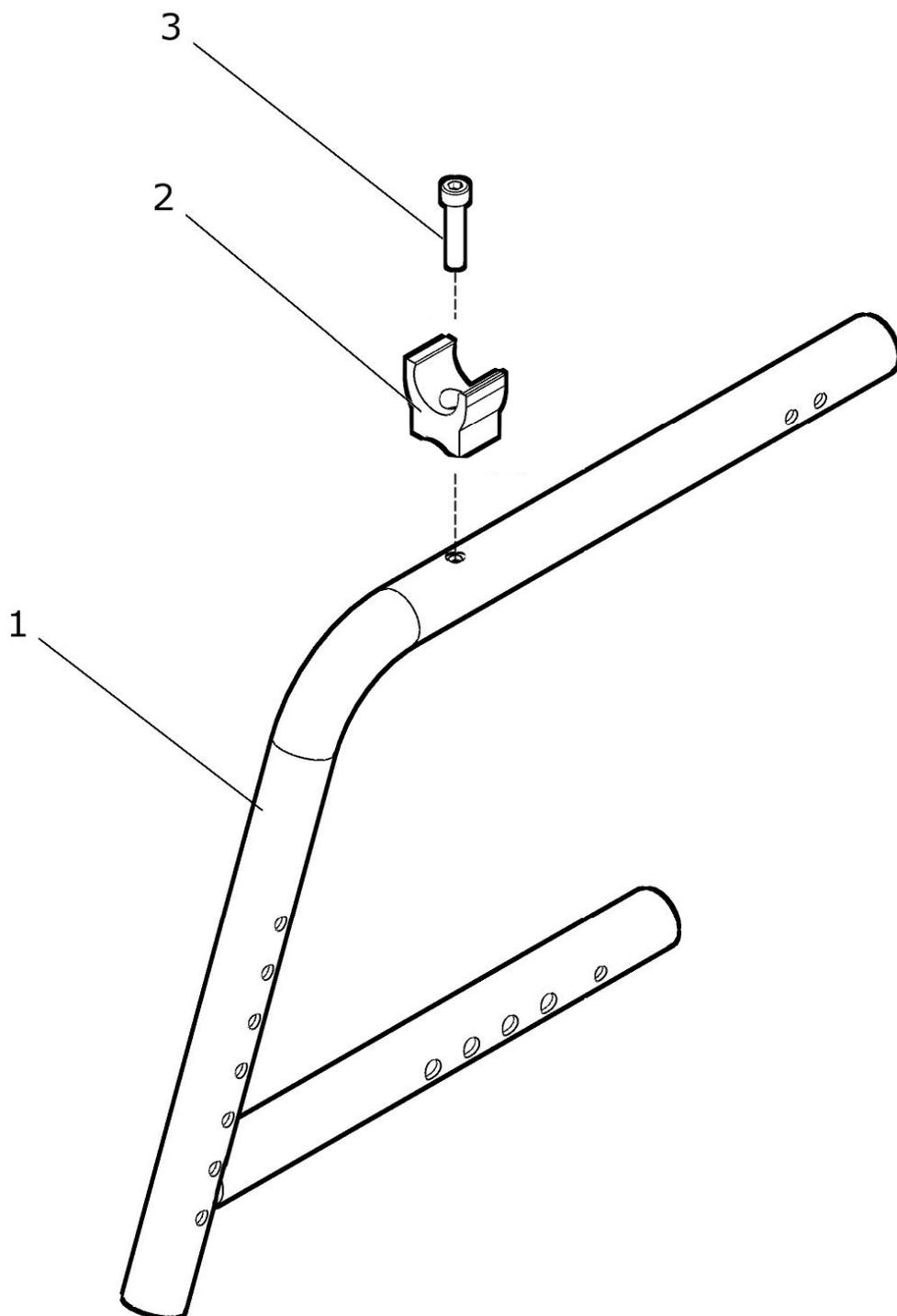Rahmen vorne 70° gebogen gerade LITTLE SLT

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	24 111 00	Rahmenteile 70° gebogen vorne gerade LITTLE (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 3	24 111 20	Rahmenteil 70° gebogen vorne gerade LITTLE (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1b - 3	24 111 30	Rahmenteil 70° gebogen vorne gerade LITTLE (links) kpl. FM: ?	1 St.
1a	24 111 21	Rahmenteil 70° gebogen vorne gerade rechts LITTLE FM: ?	1 St.
1b	24 111 31	Rahmenteil 70° gebogen vorne gerade links LITTLE FM: ?	1 St.
2	50 121 01	Auflager	1 St
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	1 St.


Rahmen Abduktion vorne LITTLE SLT

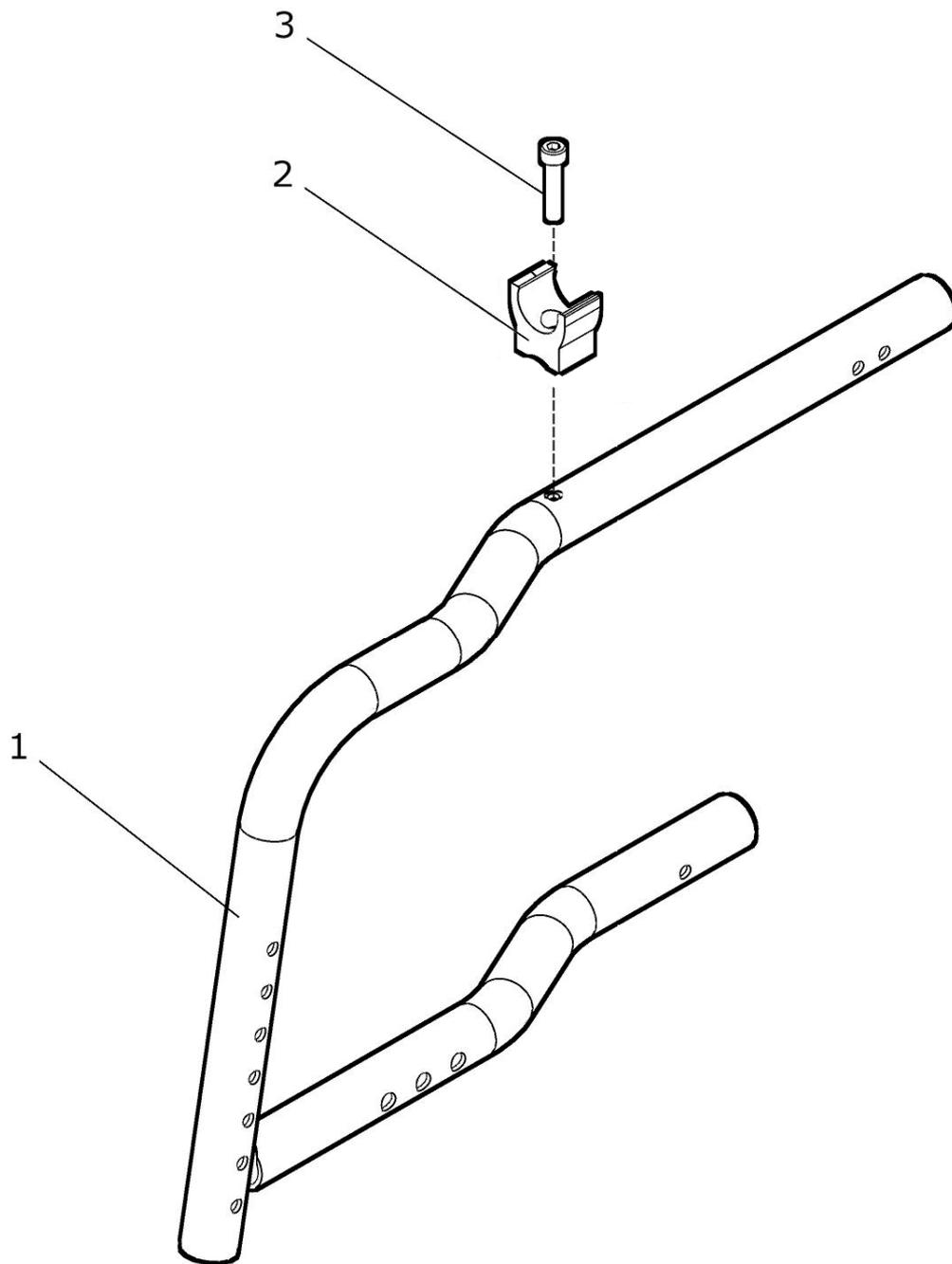

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	24 112 00	Rahmenteile Abduktion vorne ST 26-32 LITTLE (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 3	24 112 20	Rahmenteil Abduktion vorne ST 26-32 LITTLE (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1b - 3	24 112 30	Rahmenteil Abduktion vorne ST 26-32 LITTLE (links) kpl. FM: ?	1 St.
1a	24 112 21	Rahmenteil Abduktion vorne rechts ST 26-32 LITTLE FM: ?	1 St.
1b	24 112 31	Rahmenteil Abduktion vorne links ST 26-32 LITTLE FM: ?	1 St.
2	50 121 01	Auflager	1 St
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	24 112 05	Rahmenteile Abduktion vorne ST 34-38 LITTLE (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 3	24 112 40	Rahmenteil Abduktion vorne ST 34-38 LITTLE (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1b - 3	24 112 50	Rahmenteil Abduktion vorne ST 34-38 LITTLE (links) kpl. FM: ?	1 St.
1a	24 112 41	Rahmenteil Abduktion vorne rechts ST 34-38 LITTLE FM: ?	1 St.
1b	24 112 51	Rahmenteil Abduktion vorne links ST 34-38 LITTLE FM: ?	1 St.
2	50 121 01	Auflager	1 St
3	01 160 24	Zylinderschraube M6x30 - DIN 912	1 St.


Rahmen vorne gerade LITTLE AR (Sprint-Verriegelung)

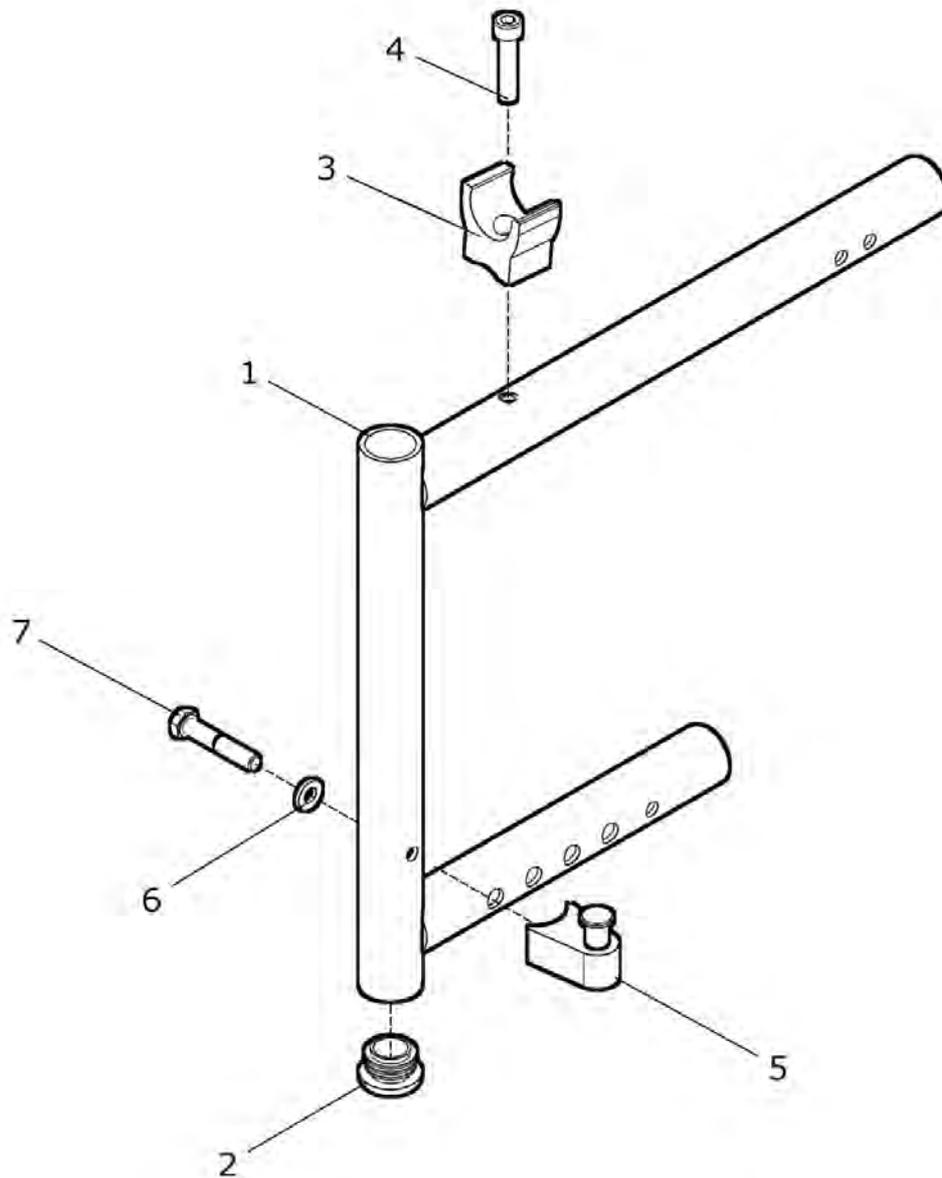

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	24 113 00	Rahmenteile vorne gerade LITTLE ST 36 – 38 (Paar) kpl. mit Aufnahmebolzen für Sprint-Verriegelung FM: ?	1 Paar
1a - 7	24 113 20	Rahmenteil vorne gerade LITTLE ST 36 – 38 (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1b – 7	24 113 30	Rahmenteil vorne gerade LITTLE ST 36 – 38 (links) kpl. FM: ?	1 St.
1a	24 113 21	Rahmenteil vorne gerade rechts LITTLE ST 36 - 38 FM: ?	1 St.
1b	24 113 31	Rahmenteil vorne gerade links LITTLE ST 36 - 38 FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschußstopfen 23x2mm	2 St.
3	50 121 01	Auflager (für Kleiderschutz)	1 St
4	01 160 24	Zylinderschraube DIN 912 M6x30	1 St.
5 – 7	50 111 00	Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl. mit Schraube und Scheibe	2 St.
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube M6x35	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	24 113 05	Rahmenteile vorne gerade LITTLE ST 26 – 34 (Paar) kpl. mit Aufnahmebolzen für Sprint-Verriegelung FM: ?	1 Paar
1c - 7	24 113 25	Rahmenteil vorne gerade LITTLE ST 26 – 34 (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1d – 7	24 113 35	Rahmenteil vorne gerade LITTLE ST 26 – 34 (links) kpl. FM: ?	1 St.
1c	24 113 22	Rahmenteil vorne gerade rechts LITTLE ST 26 - 34 FM: ?	1 St.
1d	24 113 32	Rahmenteil vorne gerade links LITTLE ST 26 - 34 FM: ?	1 St.

Rahmen vorne gerade LITTLE AR Abduktionsrahmen (Sprint-Verriegelung)

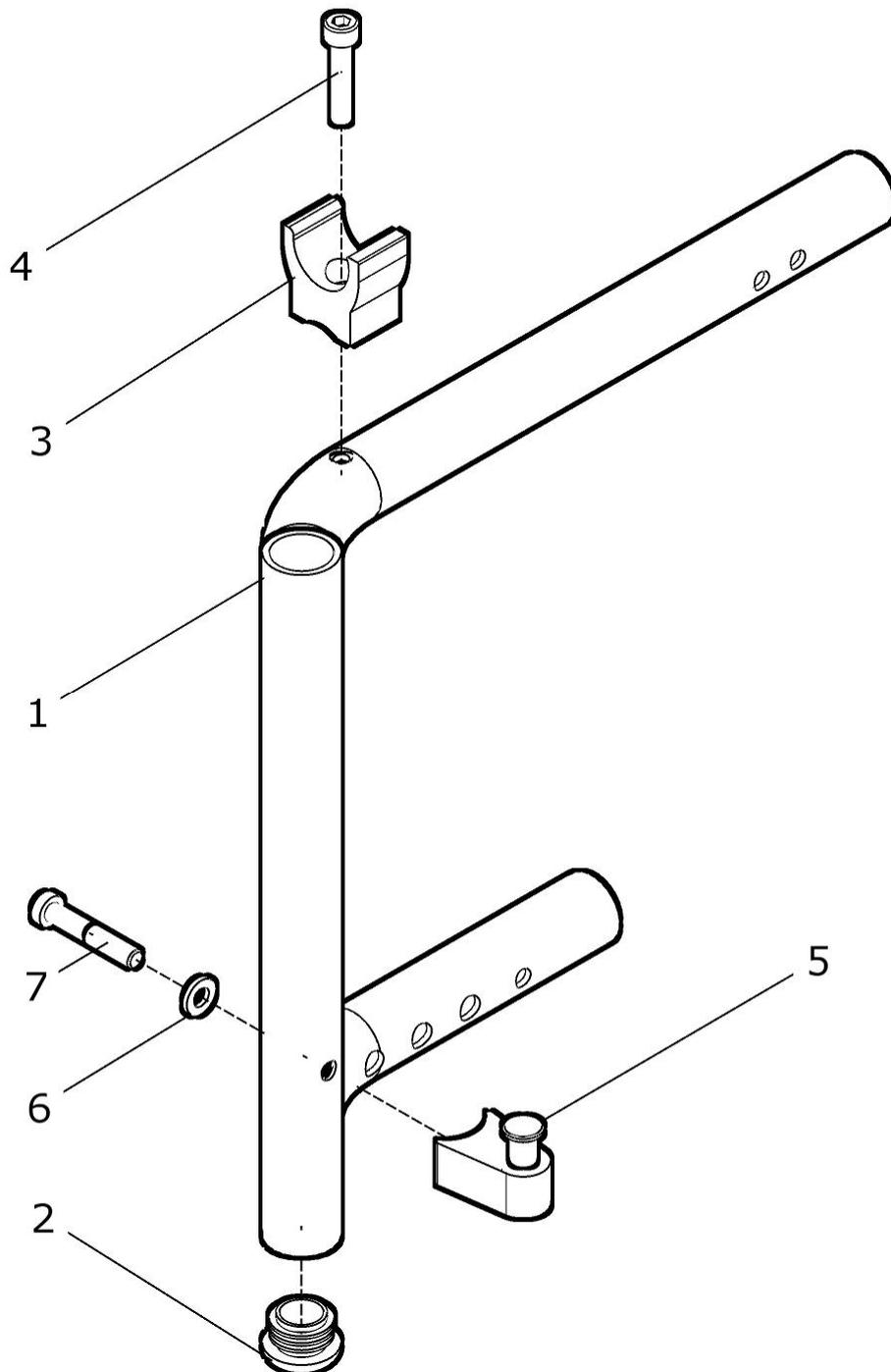


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	24 114 00	Rahmenteile vorne Abduktion LITTLE ST 36 – 38 (Paar) kpl. mit Aufnahmebolzen für Sprint-Verriegelung FM: ?	1 Paar
1a - 7	24 114 20	Rahmenteil vorne Abduktion LITTLE ST 36 – 38 (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1b – 7	24 114 30	Rahmenteil vorne Abduktion LITTLE ST 36 – 38 (links) kpl. FM: ?	1 St.
1a	24 114 21	Rahmenteil vorne Abduktion rechts LITTLE ST 36 - 38 FM: ?	1 St.
1b	24 114 31	Rahmenteil vorne Abduktion links LITTLE ST 36 - 38 FM: ?	1 St.
2	04 210 02	Verschlußstopfen 23x2mm	2 St.
3	50 121 01	Auflager (für Kleiderschutz)	1 St
4	01 160 24	Zylinderschraube DIN 912 M6x30	1 St.
5 – 7	50 111 00	Verriegelungsbolzen mit Aufnahmen kpl. mit Schraube und Scheibe	2 St.
5	50 111 20	Verriegelung (Verriegelungsbolzen mit Aufnahme)	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4	2 St.
7	01 110 05	Sechskantschraube M6x35	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	24 114 05	Rahmenteile vorne Abduktion LITTLE ST 26 – 34 (Paar) kpl. mit Aufnahmebolzen für Sprint-Verriegelung FM: ?	1 Paar
1c - 7	24 114 25	Rahmenteil vorne Abduktion LITTLE ST 26 – 34 (rechts) kpl. FM: ?	1 St.
1d – 7	24 114 35	Rahmenteil vorne Abduktion LITTLE ST 26 – 34 (links) kpl. FM: ?	1 St.
1c	24 114 22	Rahmenteil vorne Abduktion rechts LITTLE ST 26 - 34 FM: ?	1 St.
1d	24 114 32	Rahmenteil vorne Abduktion links LITTLE ST 26 - 34 FM: ?	1 St.

Verbindungsprofil Rahmen LITTLE

(Rahmen gebogen / gerade / gerade Abduktion ST 36-38)

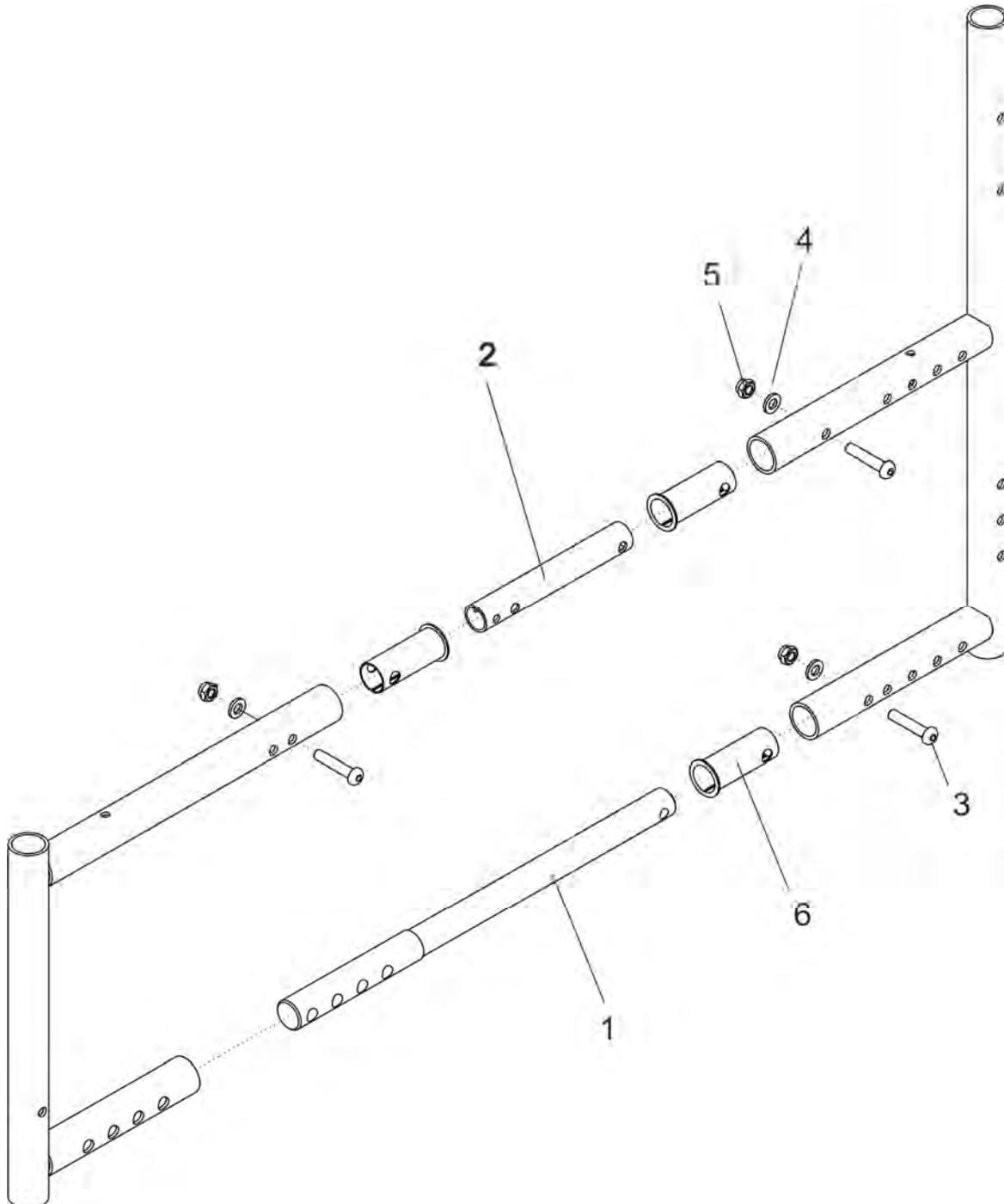

neue vordere Rahmenteile / neue Verbindungsachsen ab 04/2014
(ab Serien-Nr. 21-2006 bzw. 23-2004)

LITTLE SLT gebogen (70°)
LITTLE AR gerade ST 36-38cm


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	24 107 00	Verbindungsteile Rahmen LITTLE gebogen / gerade ST36-38 kpl. Verbindungsprofile mit Buchsen und Schrauben 1 Satz = für einen Rollstuhl komplett	1 Satz
1	24 107 01	Verbindungsprofil LRA M8 LITTLE LITTLE SLT Rahmen gebogen 70° oder 80° LITTLE AR Rahmen gerade ST36-38	2 St.
2	22 101 02	Verbindungsrohr oben Junior2	2 St.
3	01 153 24	Linsenschraube M6x30	6 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4	6 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter M6	6 St.
6	50 321 16	Buchse lang	6 St.

LITTLE AR gerade ST 26-34cm
LITTLE AR Abduktion ST 36-38cm

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	24 113 10	Verbindungsteile Rahmen LITTLE Abduktion / gerade ST26-34 kpl. Verbindungsprofile mit Buchsen und Schrauben 1 Satz = für einen Rollstuhl komplett	1 Satz
1	24 113 11	Verbindungsprofil LRA M8 LITTLE LITTLE AR Rahmen gerade ST26-34 LITTLE AR Rahmen gerade Abduktion ST36-38	2 St.
2	22 101 02	Verbindungsrohr oben Junior2	2 St.
3	01 153 24	Linsenschraube M6x30	6 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4	6 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter M6	6 St.
6	50 321 16	Buchse lang	6 St.

Verbindungsrohre Rahmen LITTLE


(Rahmen gebogen Abduktion / gerade Abduktion ST26-34)

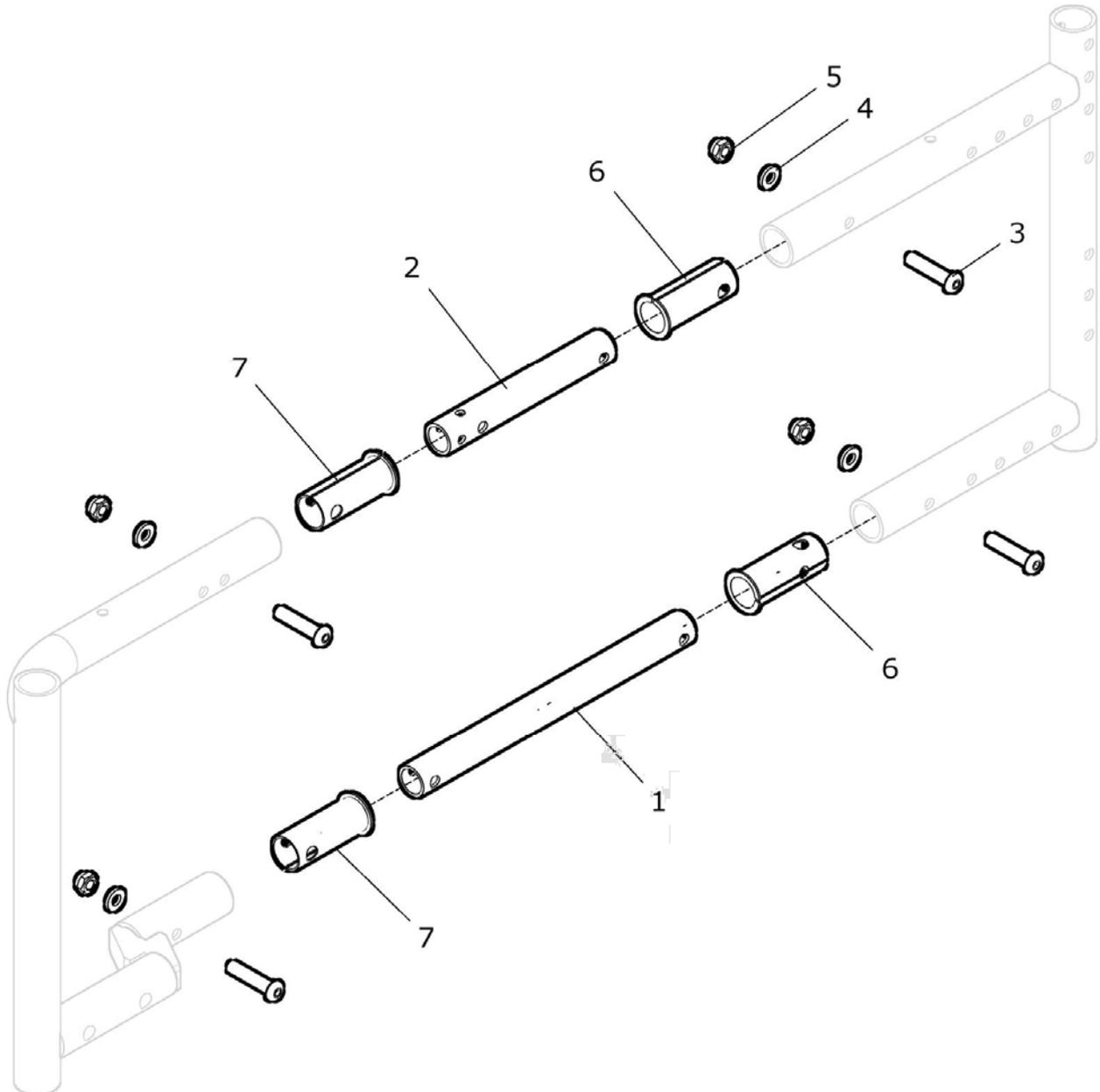

LITTLE SLT Abduktion
LITTLE AR Abduktion ST 26-34cm

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	24 114 10	Verbindungssteile Rahmen LITTLE SLT / AR kpl. Verbindungsrohre mit Buchsen und Schrauben 1 Satz = für einen Rollstuhl komplett LITTLE SLT Abduktionsrahmen LITTLE AR Abduktionsrahmen ST26-34	1 Satz
1	22 101 01	Verbindungsrohr unten JUNIOR2	2 St.
2	22 101 02	Verbindungsrohr oben JUNIOR2	2 St.
3	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	8 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	8 St.
5	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	8 St.
6	22 102 01	Buchse lang JUNIOR2	4 St.
7	50 321 16	Buchse lang	4 St.

Verbindungsrohre
für
LITTLE SLT mit Abduktionsrahmen
und
LITTLE AR mit Abduktionsrahmen (ST26-34)

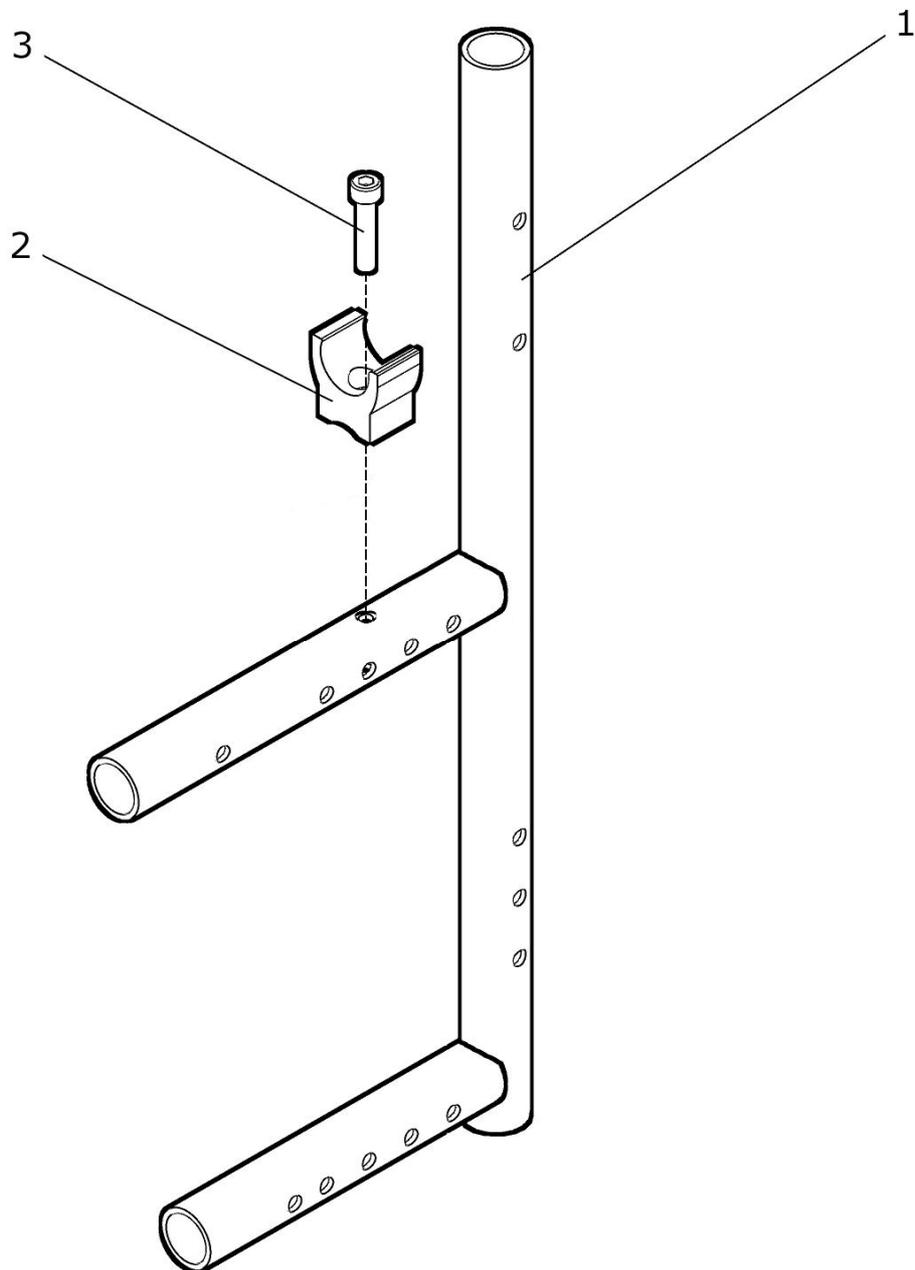Rahmen hinten LITTLE

neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	22 120 00	Rahmenteile hinten kurz JUNIOR2 (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1 – 3	22 122 00	Rahmenteil hinten kurz rechts JUNIOR2 kpl. FM: ?	1 St.
1 – 3	22 123 00	Rahmenteil hinten kurz links JUNIOR2 kpl. FM: ?	1 St.
1	22 122 01	Rahmenteil hinten kurz JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	22 120 06	Rahmenteile hinten +30mm kurz JUNIOR2 (Paar) kpl. FM: ?	1 Paar
1	22 122 06	Rahmenteil hinten +30mm kurz JUNIOR2 (rechts/links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.

Sonder-Rahmenteil:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	22 122 41	Rahmenteil hinten kurz ## Stahl ## JUNIOR2 / LITTLE (rechts/links verwendbar) FM: ?	2 St.

Rahmenteil hinten UNITOMIC (mit Griff)

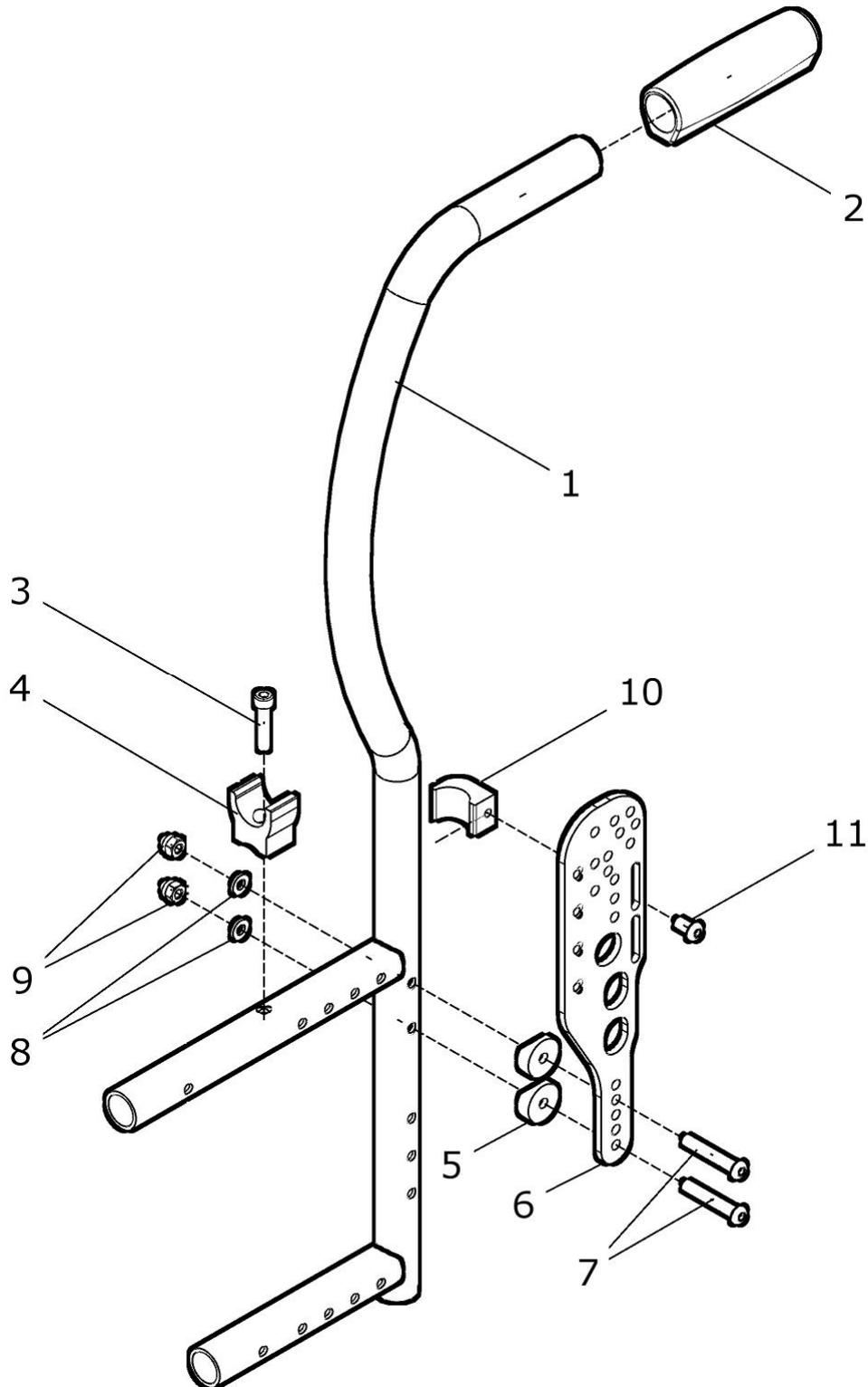

neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	22 130 50	Rahmenteile hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 kpl. rechtes und linkes Rahmenteil RH: ? FM: ?	1 Paar
1 - 4	22 132 50	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 rechts kpl. RH: ? FM: ?	1 St.
1 - 4	22 133 50	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 links kpl. RH: ? FM: ?	1 St.
1a	22 132 52	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 RH 35 FM: ?	2 St.
1b	22 132 53	Rahmenteil hinten UNITOMIC mit Griff JUNIOR2 RH 40 FM: ?	2 St.
2	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4	50 121 01	Auflager	2 St.
5 – 11	40 401 10	Aufnahme für Kleiderschutz kpl. (nur für Kleiderschutz)	1 Satz
5	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
6	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ??	2 St.
7	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
8	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
9	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
10	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
11	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

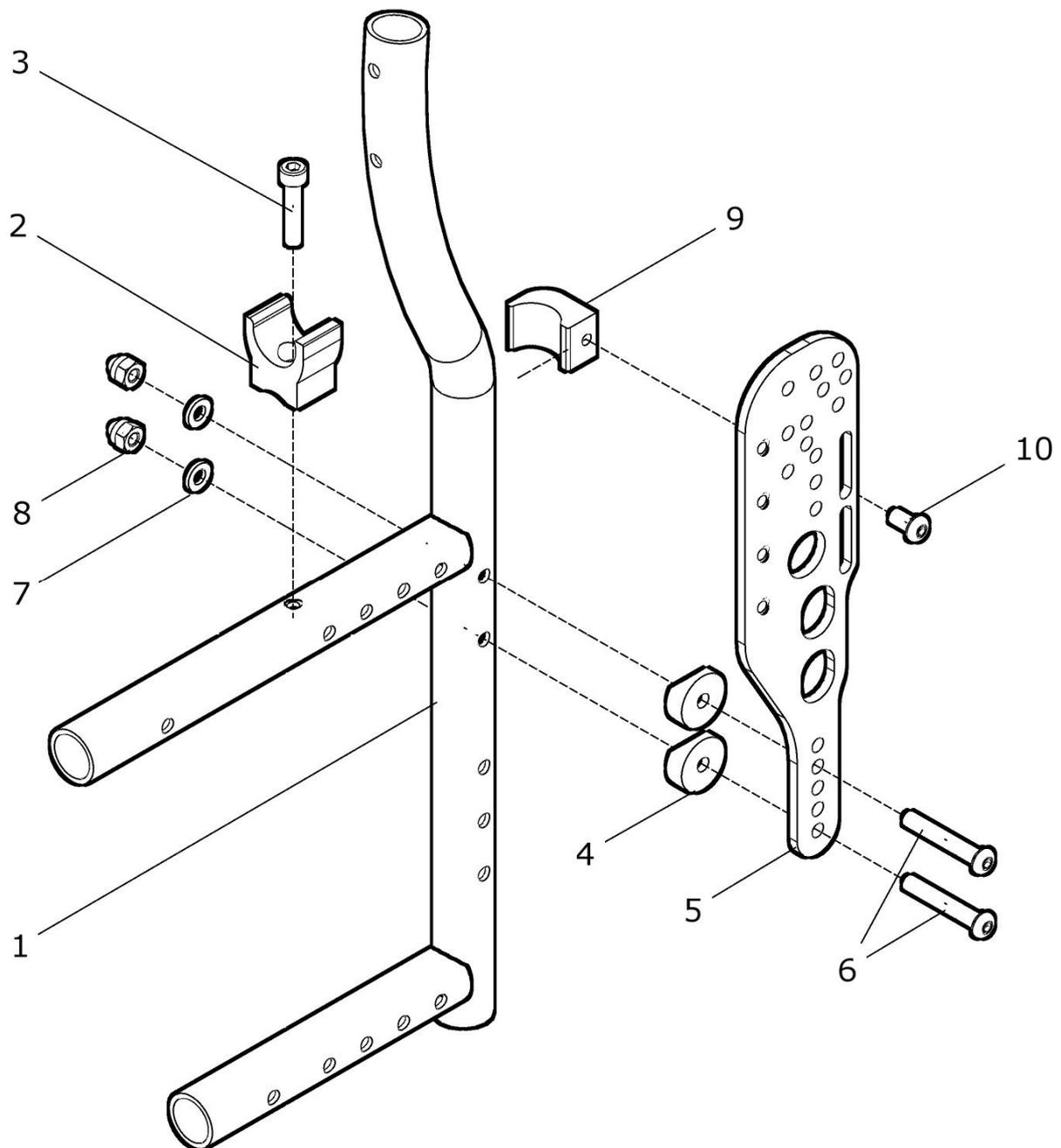Rahmenteil hinten UNITOMIC (für Schiebegriffe höhenverstellbar)

neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 3	22 130 00	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar Rahmenteile rechts und links RH: ? FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 132 0	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 rechts kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? FM: ?	1 St.
1 - 3	22 133 00	Rahmenteil hinten UNITOMIC Sch.gr. höhenv. JUNIOR2 links kpl. für Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? FM: ?	1 St.
1a	22 132 02	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 35 Schiebegr. höhenv. JUNIOR2 für Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
1b	22 132 03	Rahmenteil hinten UNITOMIC RH 40 Schiebegr. höhenv. JUNIOR2 für Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderkopfschraube - M6x30 – DIN 912	2 St.
4 – 10	40 401 10	Aufnahme für Kleiderschutz kpl. (nur für Kleiderschutz)	1 Satz
4	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
5	40 401 11	Halterung Kleiderschutz bei UNITOMIC-Rücken FM: ??	2 St.
6	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 – ISO 7380	4 St.
7	01 320 02	Scheibe – 6,4 – DIN 125	4 St.
8	01 210 83	Hutmutter – M6 – DIN 986	4 St.
9	40 401 12	Halter für Seitenteil (UNITOMIC)	2 St.
10	01 152 20	Linsenkopfschraube – M6x12 – ISO 7380	2 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment - Rücken gerade -

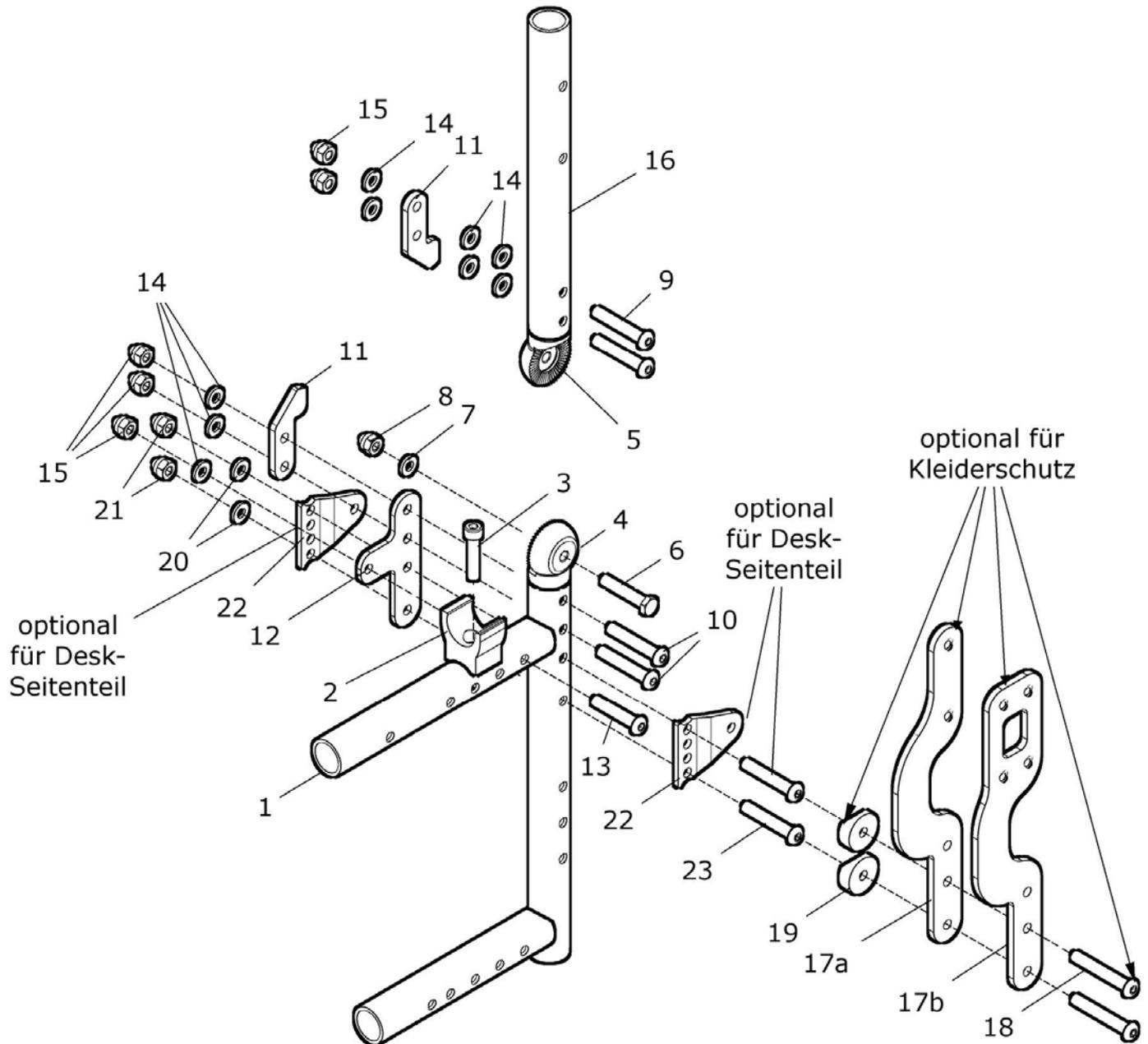

neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	22 152 80	Rahmenteile hinten rechts und links mit Zahnsegmente-Gelenk und mit Rückenrohraufnahme für Rücken gerade JUNIOR2 kpl. für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 Paar
1 - 21	22 152 82	Rahmenteil hinten rechts mit Zahnsegmente-Gelenk JUNIOR2 kpl. und mit Rückenrohraufnahme gerade für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 - 21	22 152 83	Rahmenteil hinten links mit Zahnsegmente-Gelenk JUNIOR2 kpl. und mit Rückenrohraufnahme gerade für <u>Kleiderschutz</u> anschraubbar (ohne Rückenrohr) FM: ?	1 St.
1 - 3	22 152 00	Rahmenteile hinten rechts + links f. Zahnsegment-Rücken J2 kpl. für Zahnsegment-Rücken gerade (ohne Gelenk) FM: ?	1 Paar
1 - 3	22 152 20	Rahmenteil hinten rechts für Zahnsegment-Rücken gerade J2 kpl. (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1 - 3	22 152 30	Rahmenteil hinten links für Zahnsegment-Rücken gerade J2 kpl. (ohne Gelenk) FM: ?	1 St.
1	22 152 01	Rahmenteil hinten für Zahnsegment-Rücken gerade JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 - 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken mit Zahnsegment re. und li. JUNIOR2 für rechts und links (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 - DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.
10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.

11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16	50 271 21	Rückenrohraufnahme für Rücken gerade mit Zahnsegment	2 St.
17a – 21	40 401 50	Halterung Kleiderschutz für Rücken gerade kpl.	2 Set
17b – 21	40 401 60	Halterung Kleiderschutz versetzt für Rücken gerade kpl.	2 Set
17a	40 401 51	Halterung Kleiderschutz Rücken gerade	2 St.
17b	40 401 61	Halterung Kleiderschutz versetzt Rücken gerade	2 St.
18	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
19	50 321 11	KU-Halbschale 6,2	4 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.


Umbausatz - Rahmenteile mit Rückenrohre komplett:

o. Bild	22 152 90	Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohr mit Griff vormontiert (ohne Rückenbespannung) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz /anschraubbar oder steckbar) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	1 Satz
---------	-----------	---	--------

o. Bild	22 152 95	Umbausatz - Rahmenteile hinten mit Zahnsegmente-Gelenk kpl. Rückenrohraufnahme für Rücken gerade und mit Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar vormontiert (ohne Rückenbespannung) (ohne Schiebegriffhalter / ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? ab RH 35 FM: ? Seitenteil: ? (Kleiderschutz anschraubbar oder steckbar) vorhandene Rückenbespannung standard / anpaßbar: ?	1 Satz
---------	-----------	---	--------


**Weitere Informationen siehe Kapitel 2 - Rücken -
Rückenrohre RH -10cm wählen !!!!!**

Gelenksatz mit Klemmhebel - Rücken gerade - mit Zahnsegment

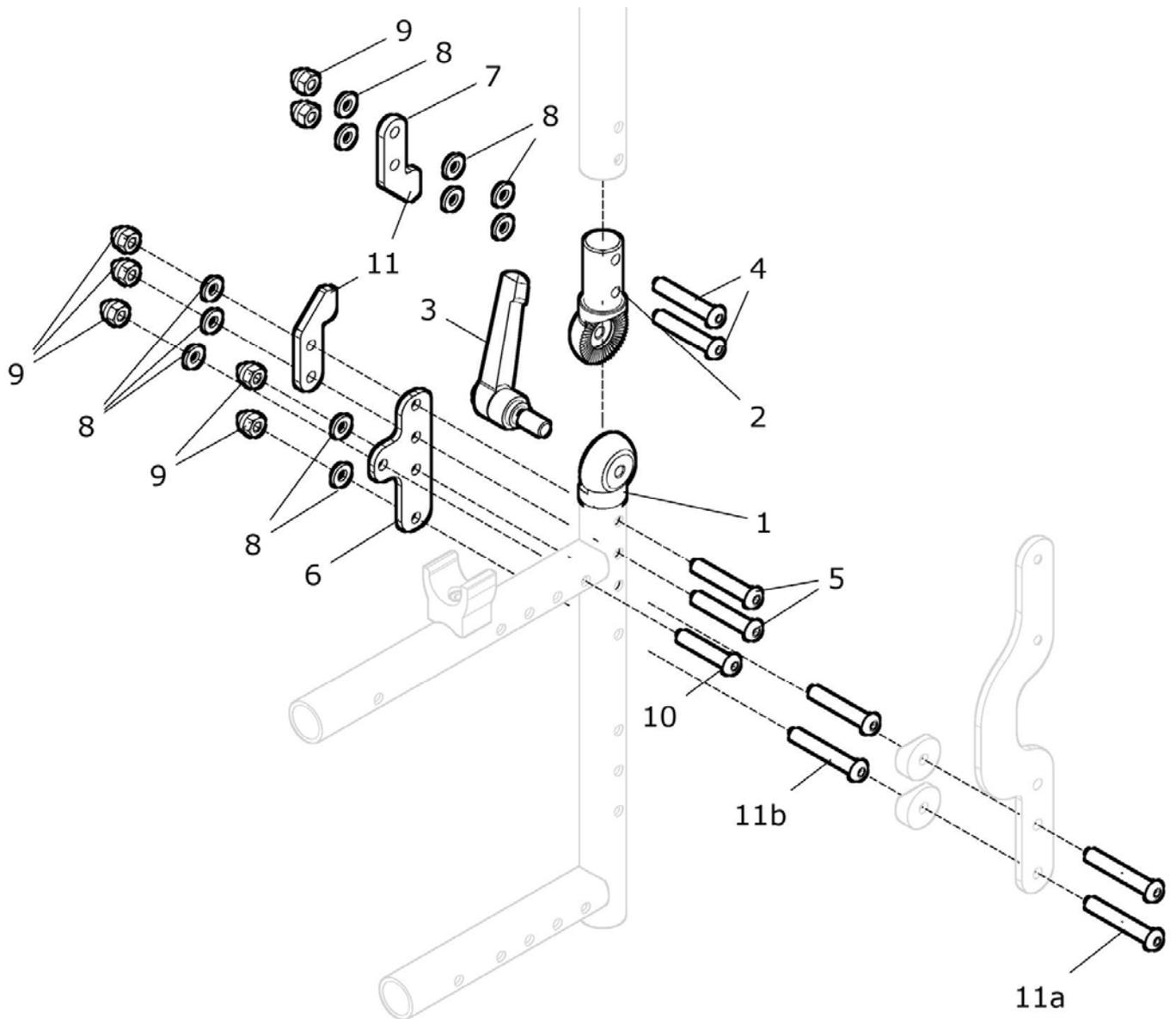

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	22 262 50	Gelenksatz mit Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnseg. rechts und links, für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
1a, 2a, 3 - 11	22 262 52	Rückengelenk-Set rechts Zahnsegment/Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 kpl. (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
1b, 2b, 3 - 11	22 262 53	Rückengelenk-Set links Zahnsegment/Klemmhebel für Rücken gerade mit Zahnsegment JUNIOR2 kpl. (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
1a	40 261 61	Gelenk unten rechts M8 für Klemmhebel	1 St.
1b	40 261 71	Gelenk unten links ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2a	40 261 62	Gelenk oben rechts Ø8,2 für Klemmhebel	1 St.
2b	40 261 72	Gelenk oben links M8 für Klemmhebel	1 St.
3	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
4	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.
5	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	2 St.
6	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
7	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
8	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	22 St.
9	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	14 St.
10	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
11a	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380 bei Kleiderschutz anschraubbar	4 St.
11b	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380 bei Kleiderschutz steckbar	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment – UNITOMIC Rücken mit Griff

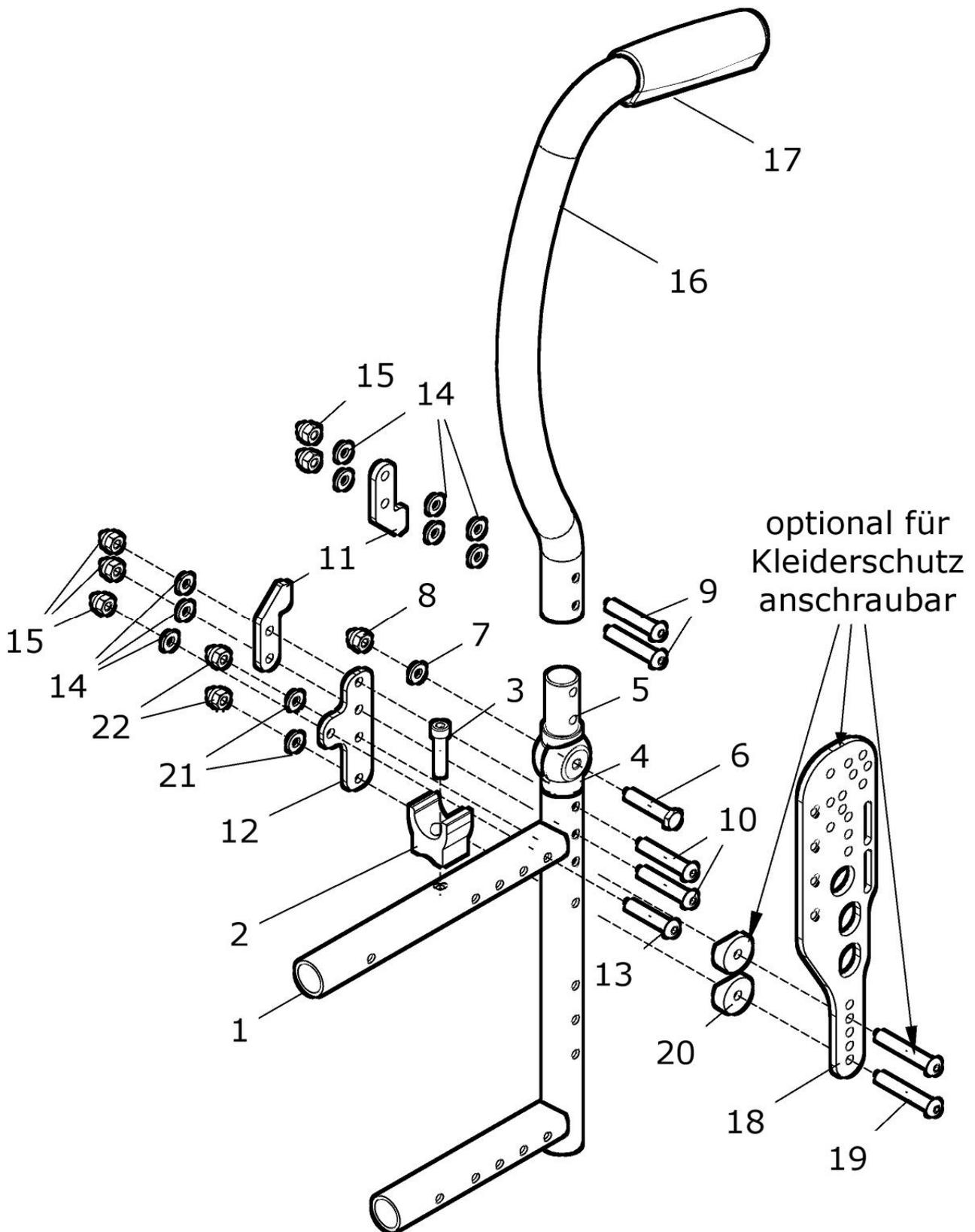


neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 142 80	Rahmenteile hinten re./li. mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 rechts und links RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 17	22 142 82	Rahmenteil hinten rechts mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 17	22 142 83	Rahmenteil hinten links mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken mit Griff JUNIOR2 RH: 40cm FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 00	Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment rechts und links JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 3	22 142 20	Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 30	Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1	22 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment JUNIOR2 für rechts und links (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.
10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.

12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16	40 261 22	Rückenrohr UNITOMIC für Zahnsegment mit Griff RH 40 FM: ?	2 St.
17	04 200 01	Griff schwarz	2 St.
18 – 22	40 401 40	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.	1 Satz
18	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC	2 St.
19	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
20	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
21	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
22	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.

Rahmenteil hinten mit Zahnsegment und UNITOMIC Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar

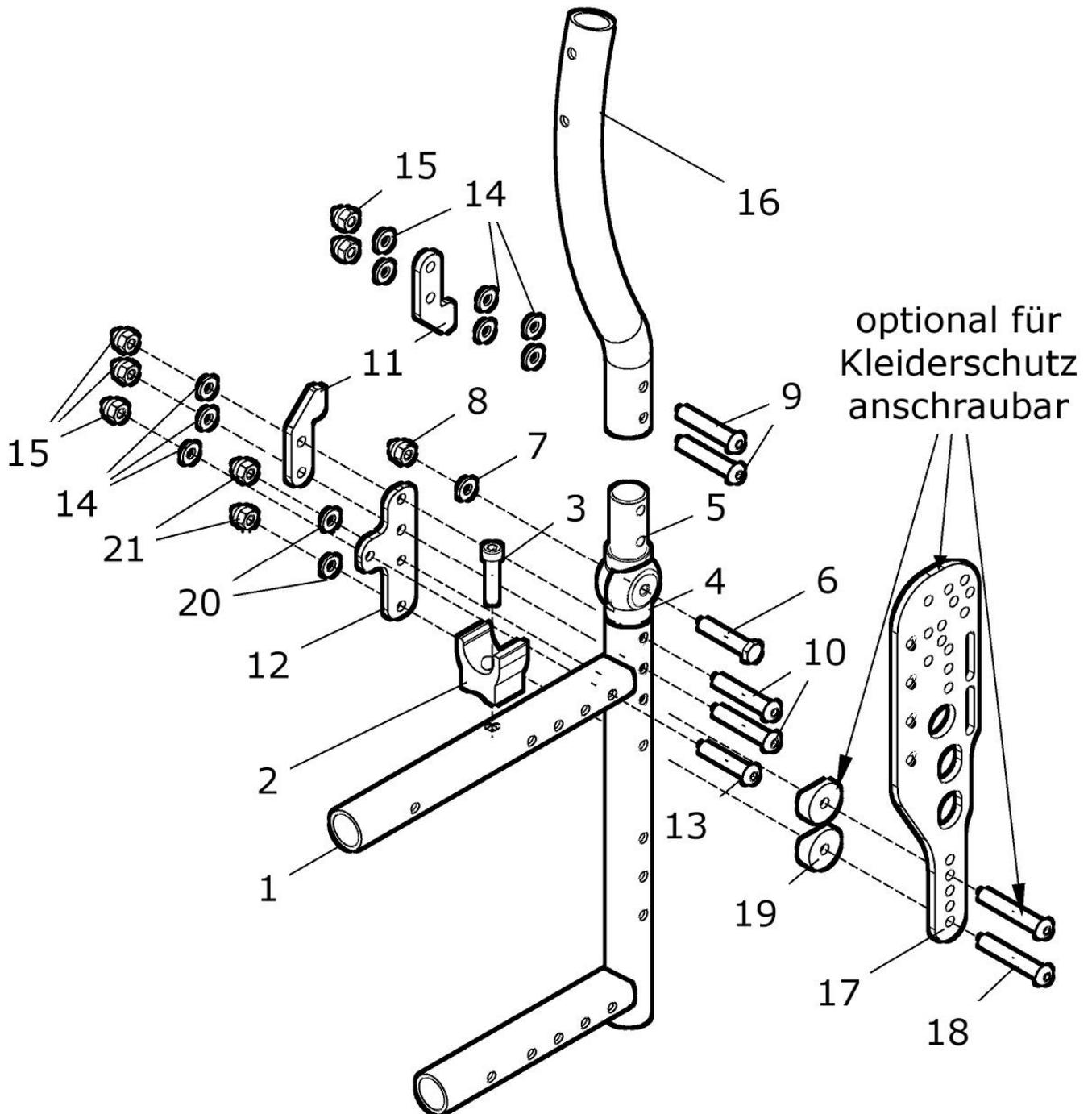


neue hintere Rahmenteile ab 01/2015 (ab Serien-Nr. 21-2040 bzw. 23-2016)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 16	22 142 90	Rahmenteile hinten re./li. mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts und links JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 16	22 142 92	Rahmenteile hinten rechts mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 16	22 142 93	Rahmenteile hinten links mit Zahnsegmente und mit UNITOMIC-Rücken für Schiebegriffe höhenverstellbar JUNIOR2 (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ? (ab RH 35cm) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 00	Rahmenteile hinten für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment rechts und links; JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 Paar
1 – 3	22 142 20	Rahmenteil hinten rechts für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1 – 3	22 142 30	Rahmenteil hinten links für Rücken UNITOMIC / Zahnsegm. JUNIOR2 (ohne Gelenk) FM: ?	kpl. 1 St.
1	22 142 01	Rahmenteil hinten UNITOMIC für Zahnsegment JUNIOR2 (rechts / links verwendbar) FM: ?	2 St.
2	50 121 01	Auflager	2 St.
3	01 160 24	Zylinderschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4 – 15	22 262 10	Gelenksatz für Rücken UNITOMIC mit Zahnsegment für rechts und links JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme) (1 Satz pro Rollstuhl)	1 Satz
4 - 15	22 262 12	Gelenksatz rechts für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4 - 15	22 262 13	Gelenksatz links für Rücken mit Zahnsegment JUNIOR2 (ohne Rückenrohraufnahme)	1 Set
4	40 142 03	Gelenk unten für Rahmen mit Zahnsegment	2 St.
5	40 261 01	Gelenk oben für Rücken mit Zahnsegment	2 St.
6	01 110 05	Sechskantschraube - M6x35 DIN 931	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
9	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	4 St.


10	01 153 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
11	40 261 02	Anschlag für Gelenk	4 St.
12	22 152 02	Knotenblech für Rahmen mit Zahnsegment JUNIOR2	2 St.
13	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380	2 St.
14	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	18 St.
15	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	10 St.
16a	40 262 21	Rückenrohr UNITOMIC RH 35 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
16b	40 262 22	Rückenrohr UNITOMIC RH 40 für Zahnsegment mit Schiebegriffe höhenverstellbar FM: ?	2 St.
17 – 21	40 401 40	Halterung Kleiderschutz UNITOMIC-Rücken/Zahnsegmente kpl.	1 Satz
17	40 401 11	Halterung Kleiderschutz Rücken UNITOMIC	2 St.
18	01 153 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	4 St.
19	50 321 11	Halbschale 6,2	4 St.
20	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
21	01 210 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	4 St.

Kippsicherung abgekröpft

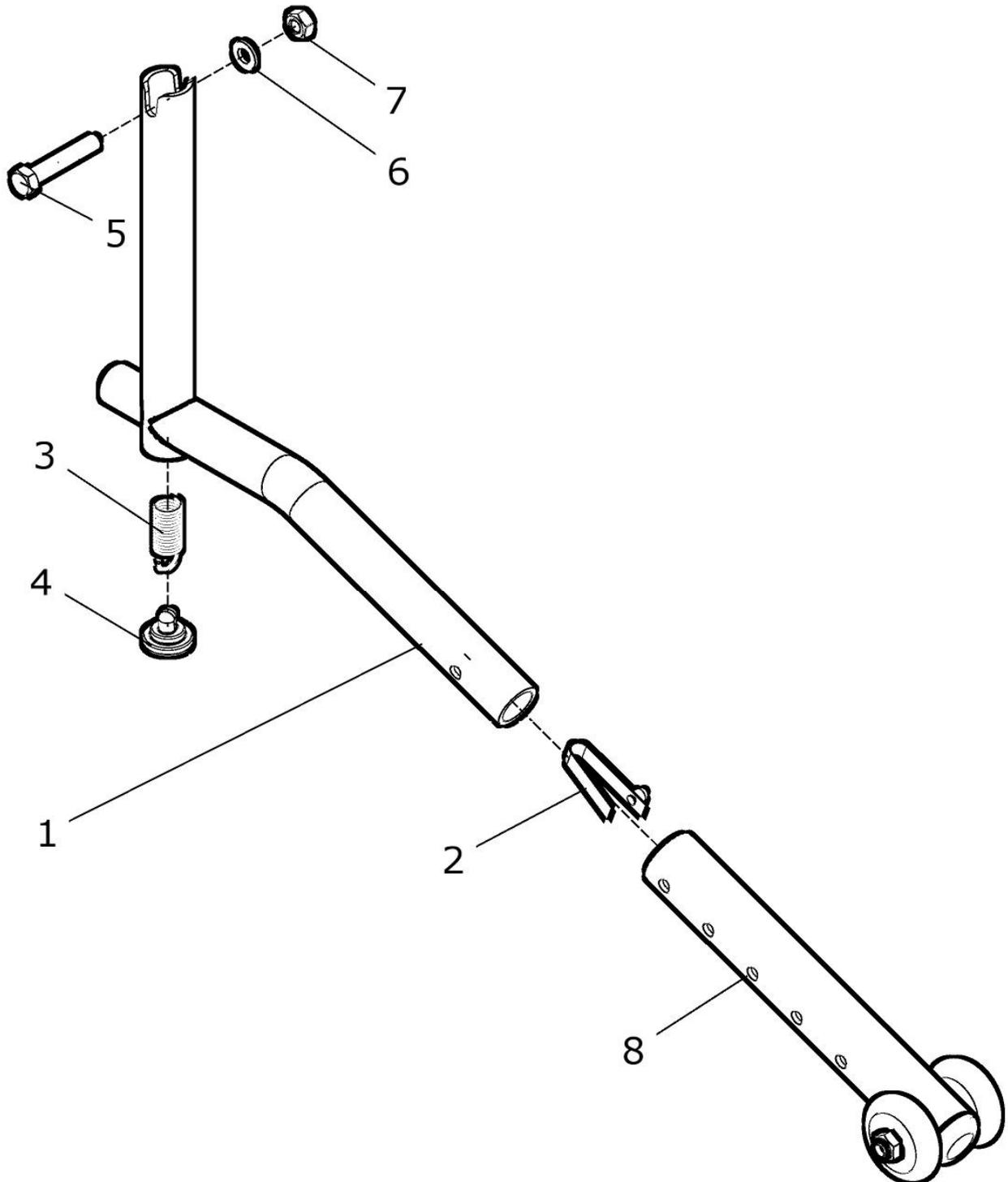


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8	50 190 00	Kippsicherung abgekröpft abschwenkbar kpl.	1 St.
1 - 7	50 192 00	Kippsicherungsadapter abgekröpft kpl.	1 St.
1	50 192 01	Kippsicherungsadapter abgekröpft	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 - 7	50 190 10	Montagesatz Kippsicherung kpl.	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.

Kippsicherung gerade

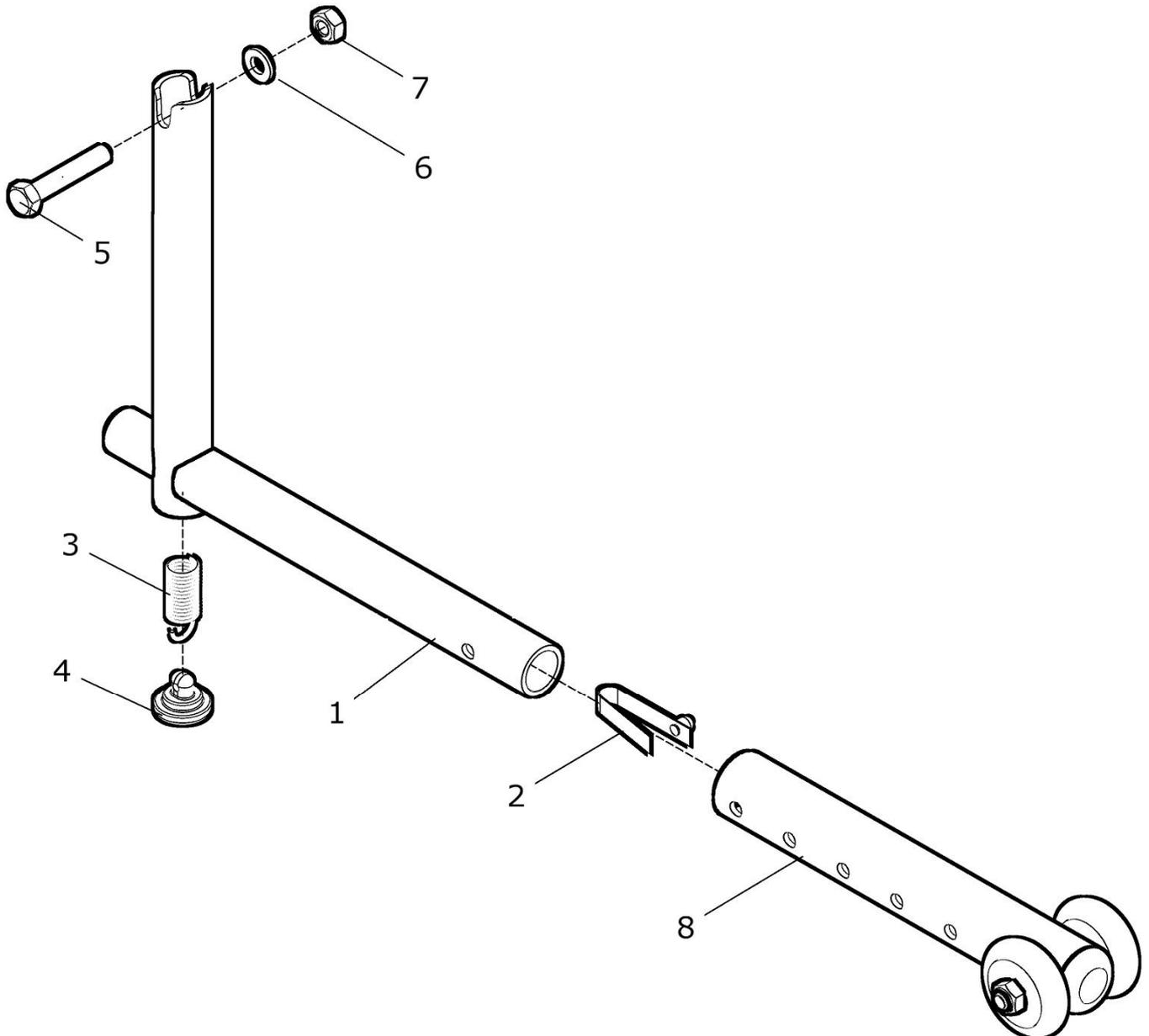


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	30 190 50	Kippsicherung gerade abschwenkbar kpl.	1 St.
1 – 7	30 192 50	Kippsicherungsadapter gerade kpl.	1 St.
1	30 192 52	Kippsicherungsadapter gerade	1 St.
2	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
3 – 7	50 190 10	Montagesatz Kippsicherung kpl.	1 St.
3	02 120 01	Zugfeder	1 St.
4	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
7	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
8	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.

Ankippbügel

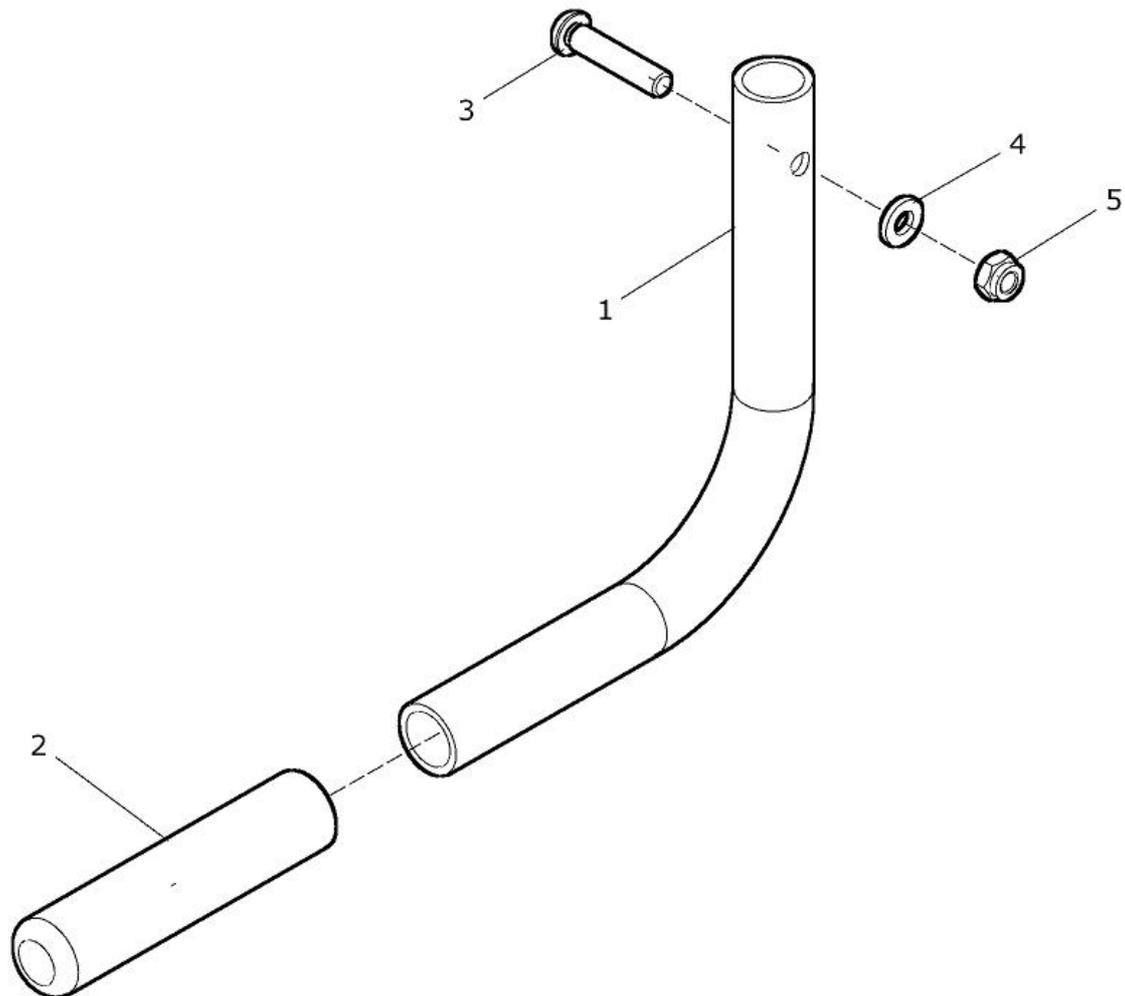


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	50 170 00	Ankippbügel kpl.	1 St.
1	50 172 01	Ankippbügelrohr	1 St.
2	04 201 21	Kappe für Ankippbügel	1 St.
3	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.

Ankippbügel gerade am Rahmen montiert

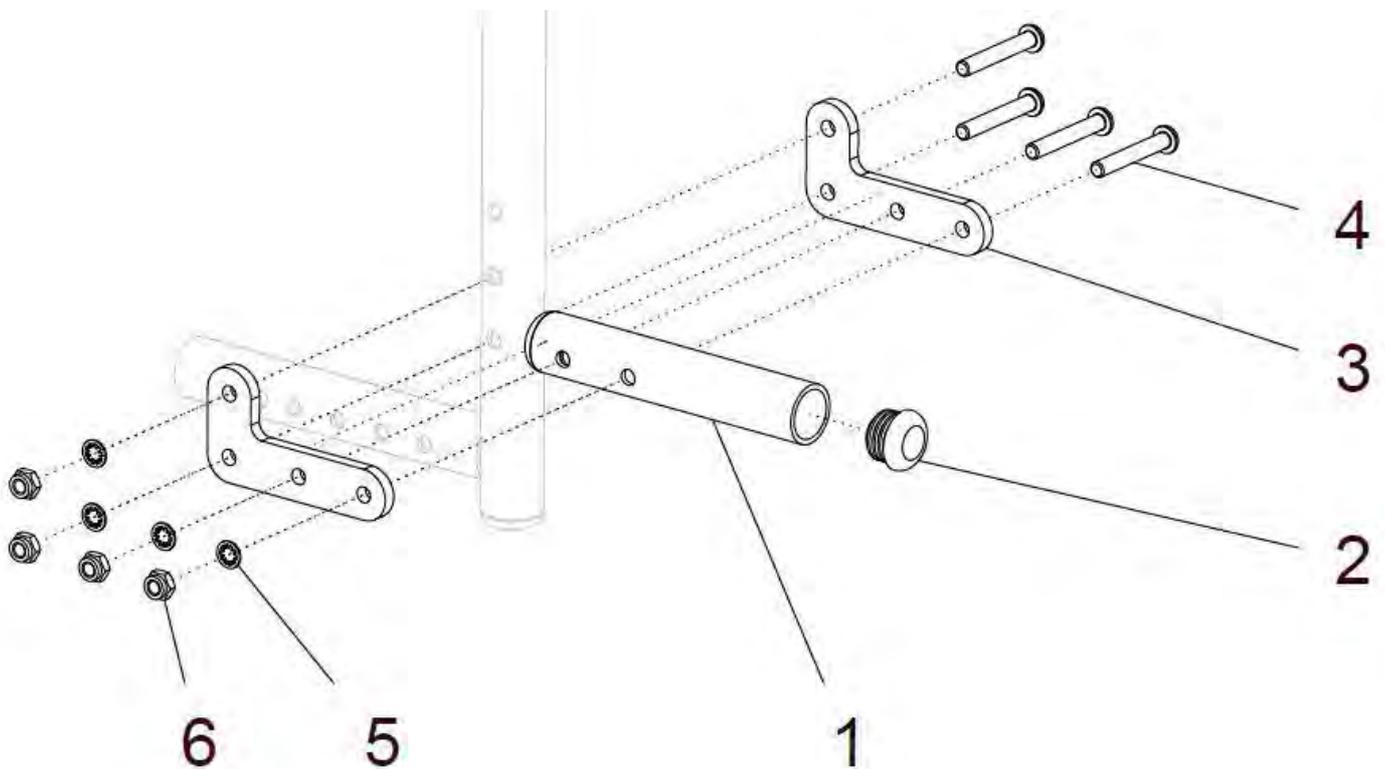


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	50 174 00	Ankippbügel gerade am Rahmen montiert kpl.	1 St.
1	50 174 11	Ankippbügelrohr gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorrzscheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.

Transitrolle

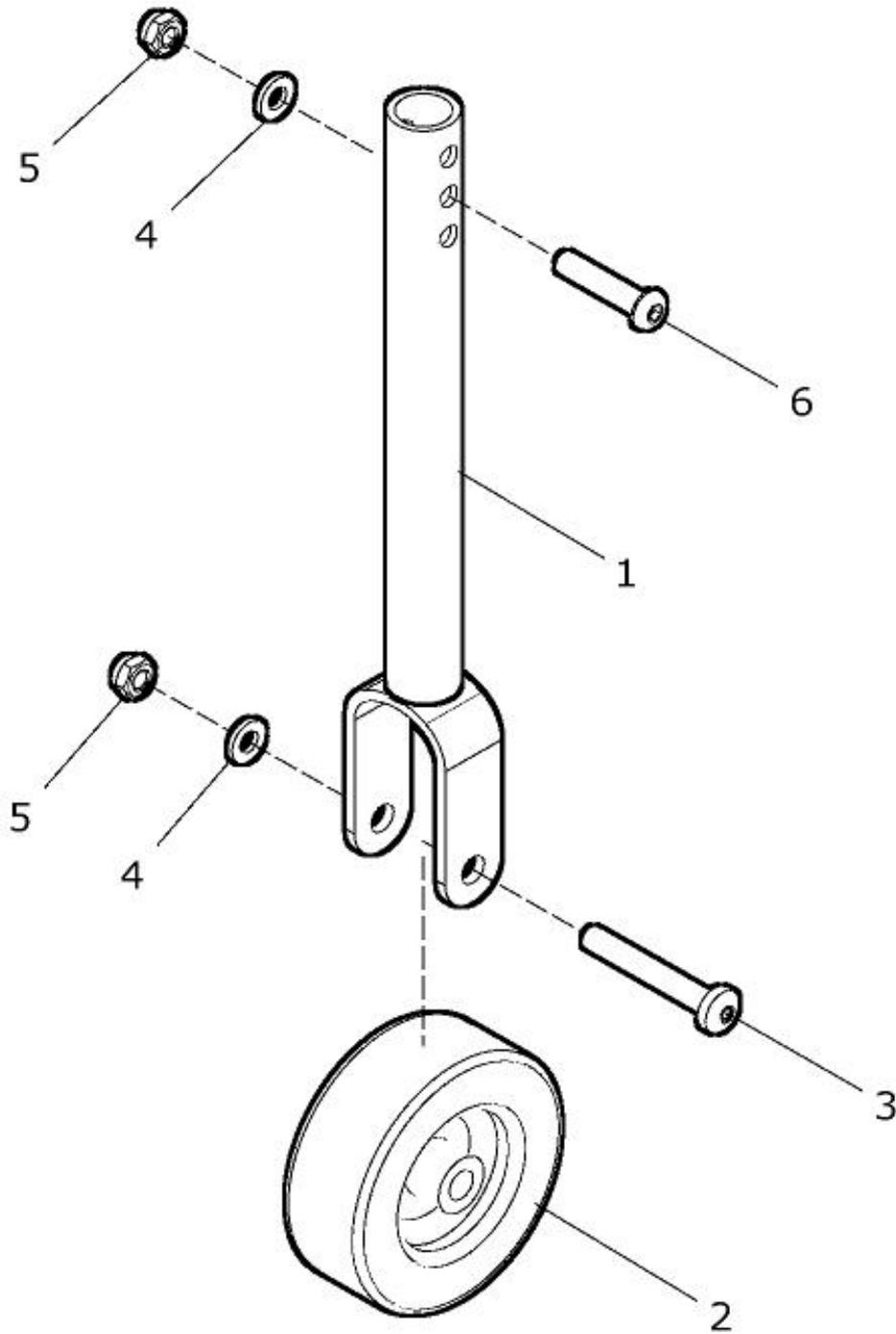


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 180 00	Transitrolle kpl.	1 St.
1 - 5	50 182 00	Transitrollenhalter mit Rad kpl.	1 St.
1	50 182 01	Transitrollenhalter (ohne Rad)	1 St.
2	05 201 71	Transitrollenrad	1 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	1 St.
4	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.
6	01 152 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.

Stockhalter

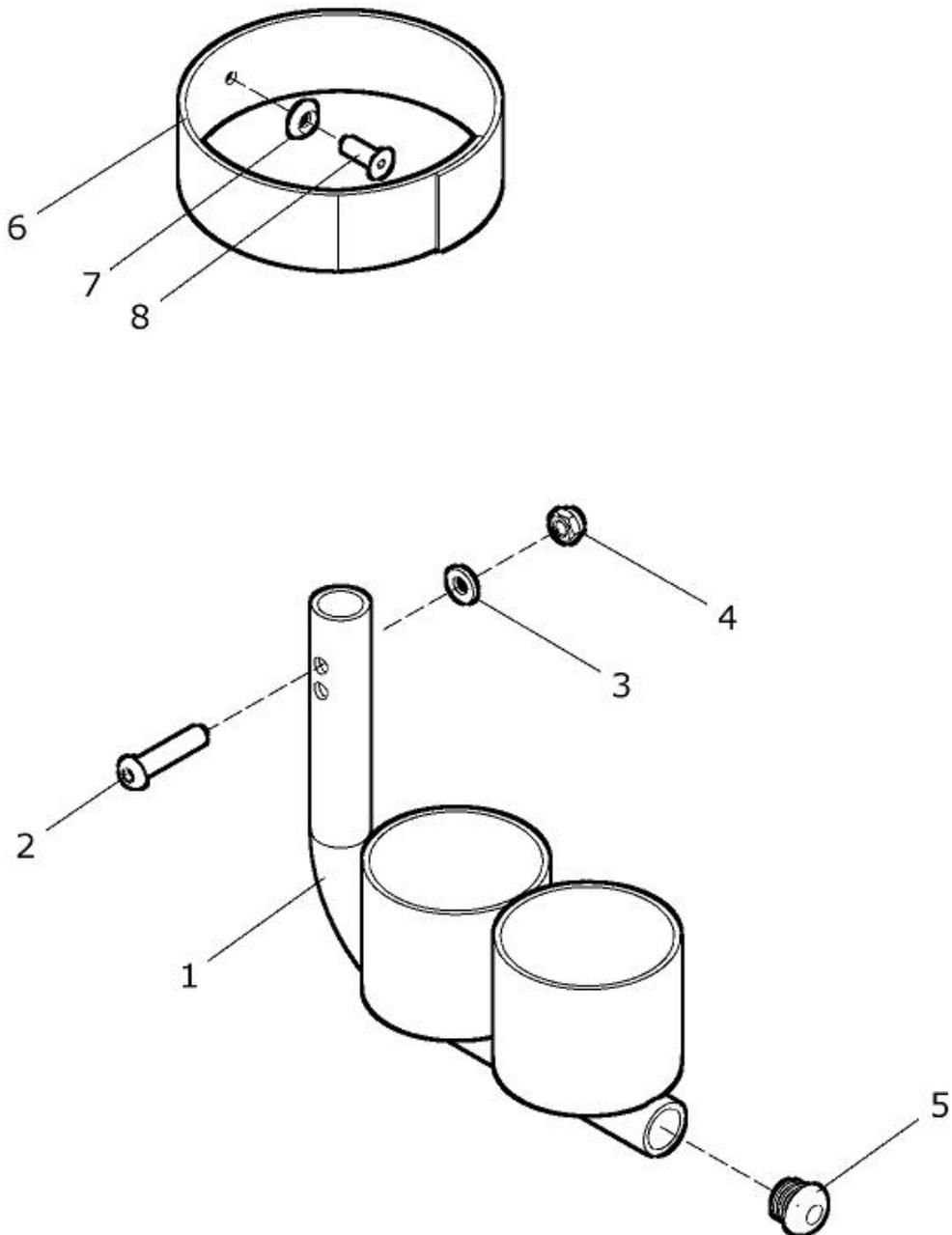


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8	50 160 00	Stockhalter kurz mit Schlaufe kpl. (standard)	1 St.
1b – 8	50 160 02	Stockhalter lang mit Schlaufe kpl. (Sonder-Version)	1 St.
1a – 5	50 162 00	Stockhalter kurz kpl.	1 St.
1b – 5	50 162 20	Stockhalter lang kpl.	1 St.
1a	50 162 01	Stockhalter kurz	1 St.
1b	50 162 02	Stockhalter lang	1 St.
2	01 152 24	Linienkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	1 St.
3	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	1 St.
4	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	1 St.
5	04 210 01	Verschlussstopfen 19x2	1 St.
6 – 8	50 162 10	Schlaufe für Stockhalter kpl.	1 St.
6	50 162 11	Schlaufe für Stockhalter (Haken- und Flauschband 20mm breit, 35cm lang, Loch in der Mitte für Schraube Pos.8)	1 St.
7	01 311 01	Rosette 6,4	1 St.
8a	01 121 40	Linsensenkschraube - M4x10 - DIN 966	1 St.
8b	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991 (bei Rücken anpaßbar mit Lasche 40 211 01 => hierbei entfällt auch Pos.7 und 8a)	1 St.

Stockhalter gerade am Rahmen montiert

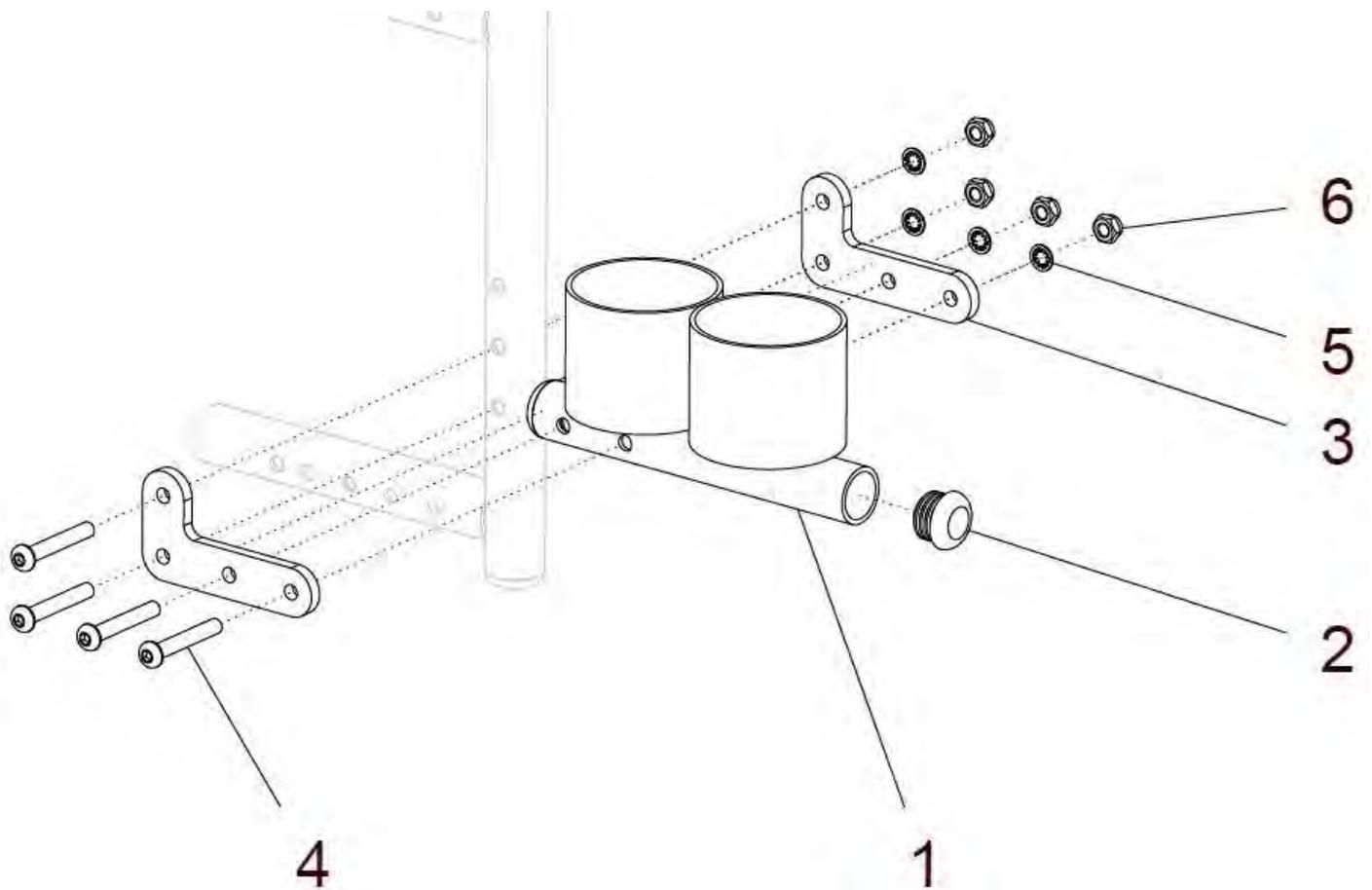

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 164 00	Stockhalter gerade am Rahmen montiert kpl.	1 St.
1	50 164 20	Stockhalter gerade	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen ø23	2 St.
3	50 164 11	Befestigungswinkel	2 St.
4	01 152 26	Linsenkopfschraube - M6x40 - ISO 7380	4 St.
5	01 330 01	Schnorrscheibe NM6	4 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.


Adapter für Rahmenanbauteile

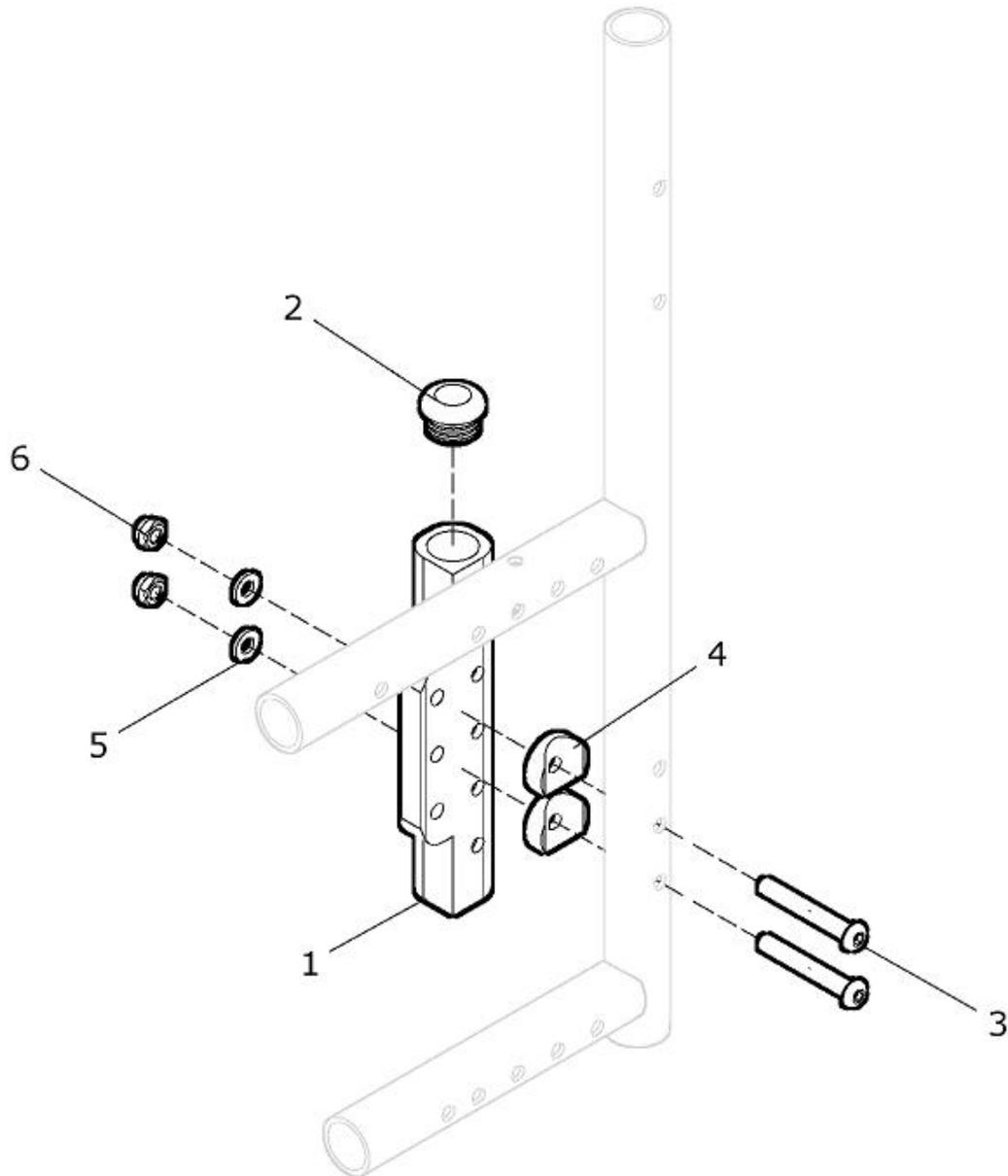


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 170 10	Adapter für Rahmenanbauteile kpl.	1 St.
1	50 172 04	Adapter	1 St.
2	04 210 02	Verschlussstopfen 23x2	1 St.
3	01 152 27	Linsenkopfschraube - M6x45 - ISO 7380	2 St.
4	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
5	01 320 02	Scheibe - ø6,4 - DIN 125	2 St.
6	01 210 03	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	2 St.

Rücken

Gruppe 2

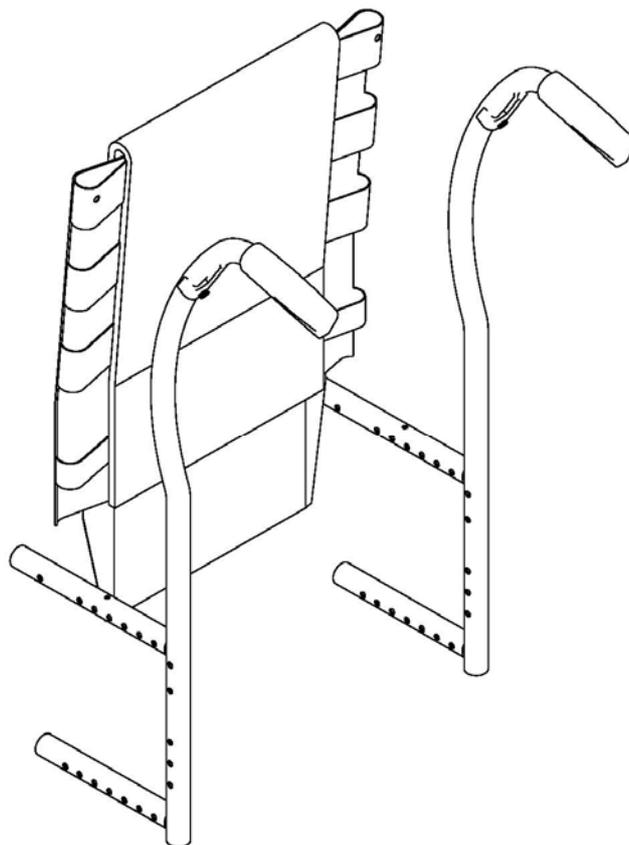

Rücken anpassbar

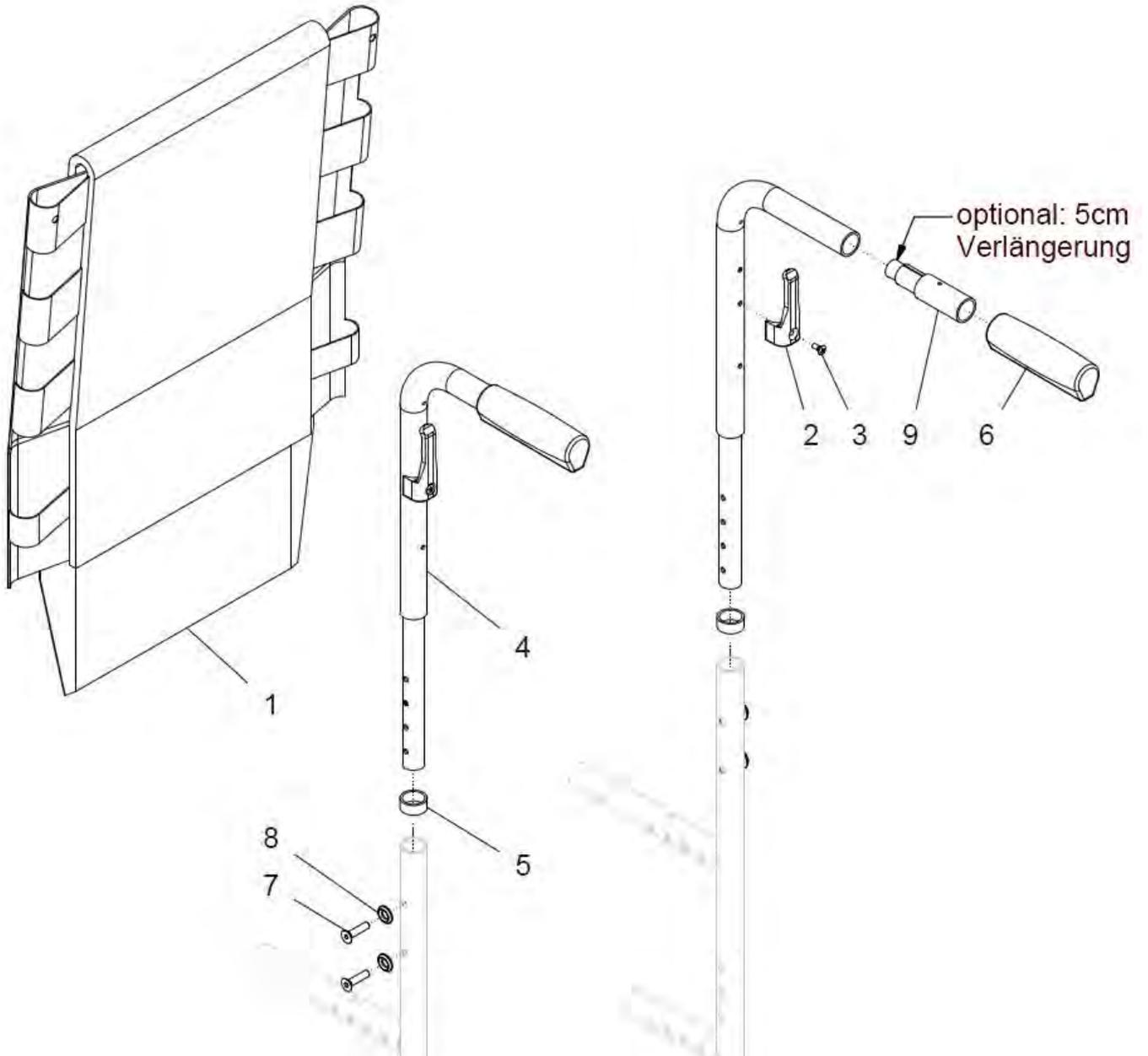


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 8 (9)	20 230 00	Rücken anpassbar mit Bespannung ST... Rückenbespannung anpassbar ST... und Rückenrohre standard mit Lasche und Griff RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	kpl. 1 St.
1b – 8 (9)	20 230 10	Rücken anpassbar mit Bespannung AGW-Stoff ... Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre standard mit Lasche und Griff RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	kpl. 1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 8	20 232 00	Rückenrohr standard mit Lasche für Rückenbespannung anpassbar RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteile: ?	kpl. 2 St.
2 – 9	20 232 50	Rückenrohr standard mit Lasche / für Trommelbremse für Rückenbespannung anpaßbar mit Verlängerung 5cm für Bremsgriff RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteile: ?	kpl. 2 St.

2	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
3	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.
4a	20 212 16	Rückenrohr RH 25 standard	2 St.
4b	50 212 11	Rückenrohr RH 30 standard	2 St.
4b	50 212 12	Rückenrohr RH 35 standard	2 St.
4b	50 212 13	Rückenrohr RH 40 standard	2 St.
5	25 111 01	Rahmenbuchse 10mm POM schwarz	2 St.
6	04 200 01	Handgriff	2 St.
7 – 8	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
7a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
7b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
7c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
8b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
8c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
9	50 734 00	Verlängerung 5cm für Bremsgriff kpl.	2 St.

Rücken anpaßbar mit Schiebegriffen höhenverstellbar

(nicht für Matrix-Rücken)

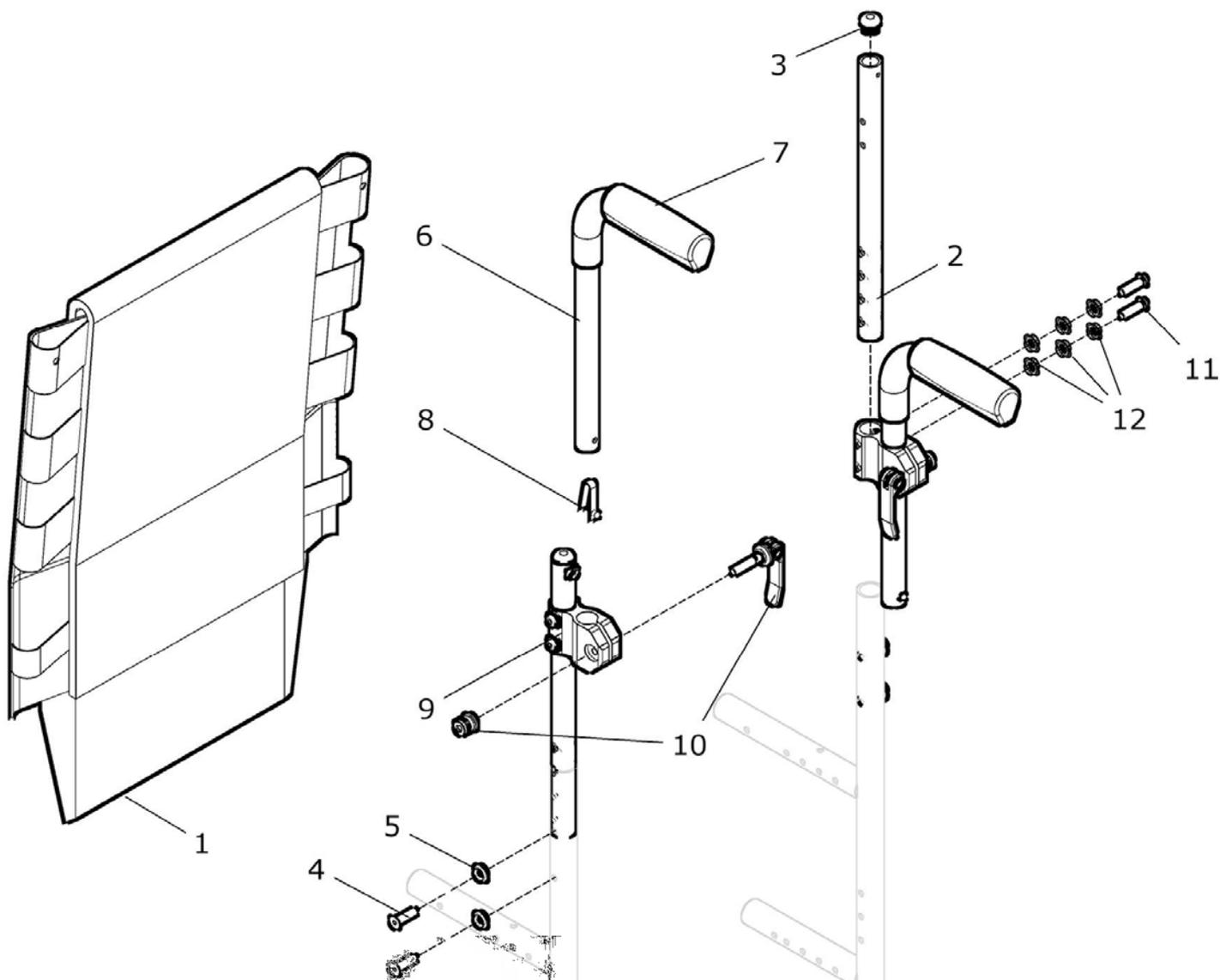


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 12	20 240 00	Rücken anpassbar mit Bespannung ST... / Schgr. höhenver. kpl. Rückenbespannung anpassbar ST... und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1b – 12	20 240 10	Rücken anpassbar mit Bespg. AGW-Stoff ... / Schgr. höhenver. kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 5	20 222 00	Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteil: ?	2 St.
2a	20 222 10	Rückenrohr gerade RH 25 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2b	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2c	20 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2d	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.

3	04 210 01	Verschlussstopfen Ø19x2mm	2 St.
4 – 5	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
4a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
4b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
4c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
5b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
6a/b – 12	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
6c/d – 12	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse kpl. Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.
6a – 8	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6b – 8	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6c – 8	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6d – 8	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Griff und Stativfeder	2 St.
6a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
6b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
6c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
6d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
7	04 200 01	Handgriff	2 St.
8	02 320 01	Stativfeder	2 St.
9a – 12	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen kpl.	2 St.
9b – 12	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen kpl. (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	2 St.
9c – 12	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen kpl. (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	2 St.
9a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)	2 St.
9b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St.


9c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang	2 St
10	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
11	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	12 St.

Rücken anpassbar UNITOMIC mit Griff

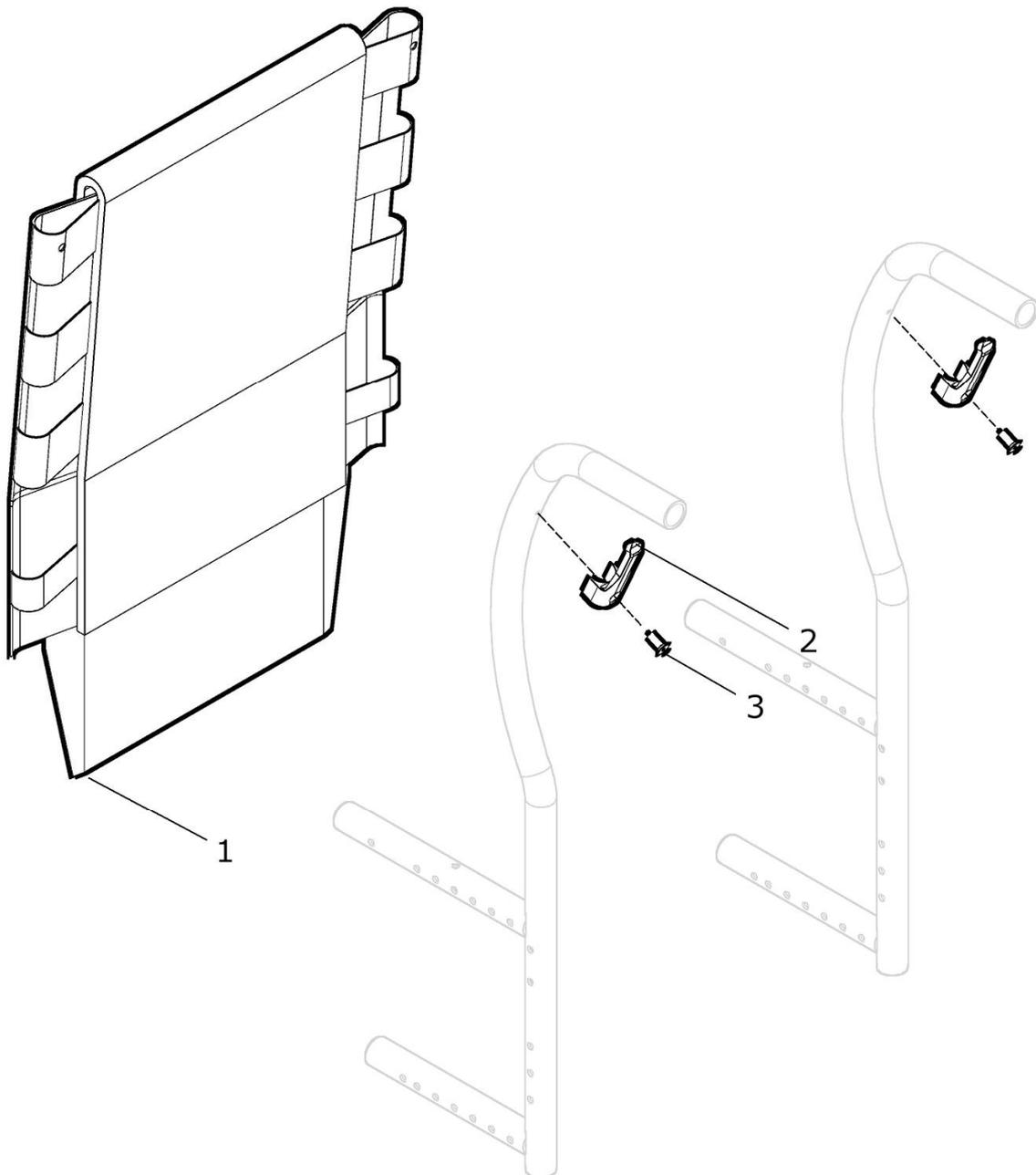

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 3	40 210 00	Rückenbespannung anpassbar Bespannung ST... kpl. Rückenbespannung anpassbar ST... mit Laschen RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b - 3	40 210 10	Rückenbespannung anpassbar Bespannung AGW-Stoff ... / kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... mit Laschen RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 35 - 40) SB: ? (SB 24 - 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2	40 211 01	Lasche für Rückenbespannung anpassbar (Kunststoff)	2 St.
3	01 120 03	Senkschraube - M5x16 - DIN 7991	2 St.


Rücken UNITOMIC anpaßbar mit Schiebegriffe höhenverstellbar

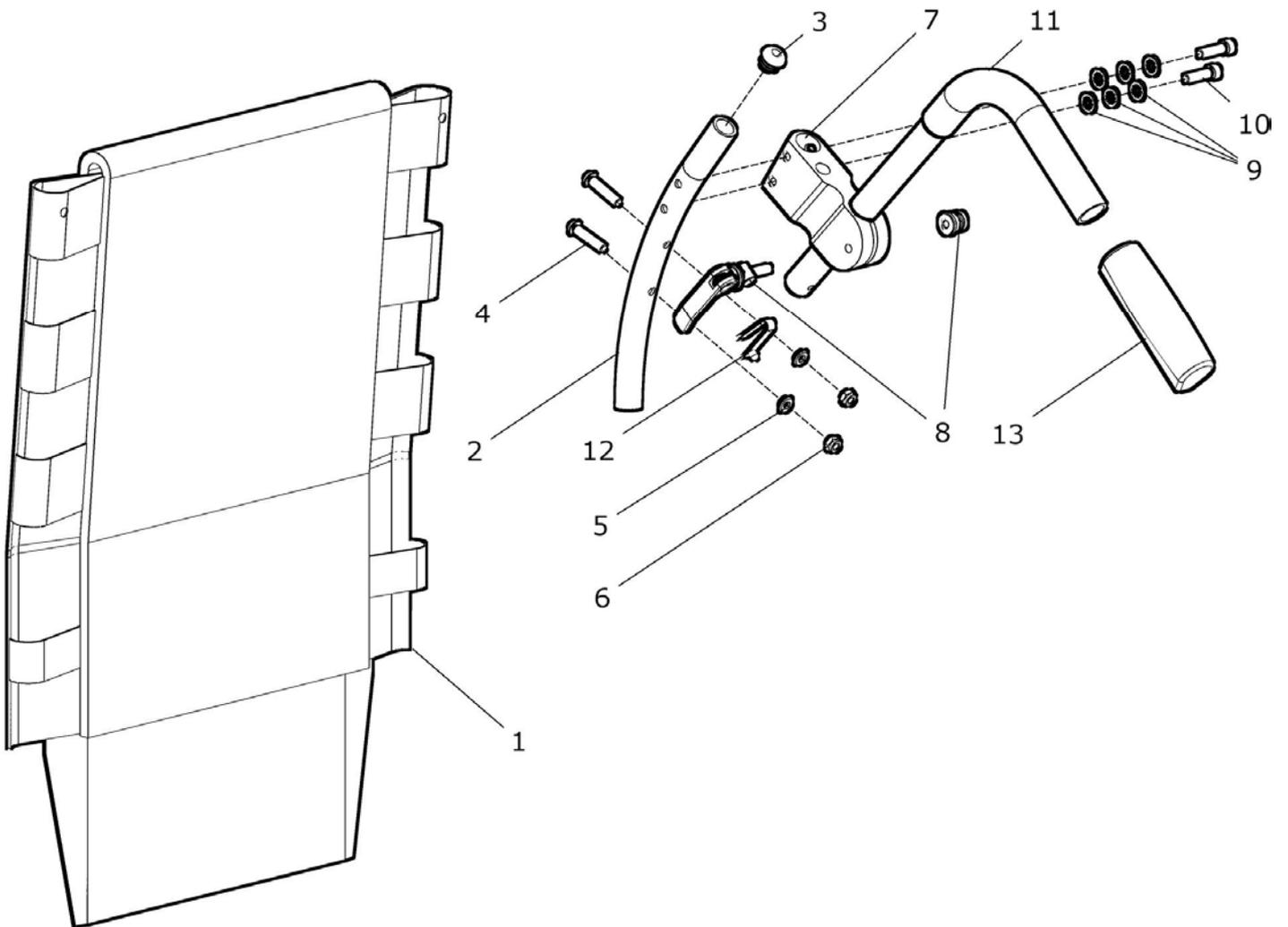

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 13	40 220 00	Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / ST... kpl. Rückenbespannung anpassbar ST ... und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...) Trommelbremse: ?	1 St.
1b – 13	40 220 10	Rücken anpassbar Schiebegr. höhenver. UNITOMIC / Stoff xx kpl. Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... und Rückenrohre für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Schiebgriffhalter UNITOMIC und Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...) Trommelbremse: ?	1 St.
1a (1a.1 + 1a.2)	40 213 00	Rückenbespannung anpassbar ST... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.1	40 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar ST... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1a.2	40 213 05	Rückenbespannungsträger anpassbar (2-teilig / rechts mit Ringe und links mit Gurte) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff standard ST...)	1 St.
1b (1b.1 + 1a.2)	45 213 00	Rückenbespannung anpassbar atmungsaktiv AGW-Stoff ... (3-teilige Rückenbespannung) RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
1b.1	45 213 01	Rückenüberwurf für Rückenbespannung anpassbar AGW-Stoff ... RH: ? (RH 35 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff ...)	1 St.
2 – 7, 8 – 11a, 12 – 13	40 221 00	Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Paar kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 Paar
2 – 7a, 8 – 11a, 12 – 13	40 222 00	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
2 – 7b, 8 – 11a, 12 – 13	40 223 00	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.

2 – 7, 8 – 11b, 12 – 13	40 221 05	Schiebegriffe höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. Paar kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 Paar
2 – 7a, 8 – 11b, 12 – 13	40 222 05	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. rechts kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC rechts und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 St.
2 – 7b, 8 – 11b, 12 – 13	40 223 05	Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC Tr.br. links kpl. Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar mit Halter UNITOMIC links und Schiebegriffe höhenverstellbar für Trommelbremse	1 St.
2	40 221 11	Rückenrohr UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar	2 St.
3	04 210 01	Verschlussstopfen 19mm	2 St.
4	01 153 24	Linsenkopfschraube - M6x30 - ISO 7380	4 St.
5	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	4 St.
6	01 210 33	Sechskantmutter - M6 - DIN 985	4 St.
7 - 10	40 225 50	Halter UNITOMIC für Schiebegriff höhenverstellbar Paar kpl. rechts und links	1 Paar
7a – 10	40 225 62	Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar rechts kpl.	1 St.
7b – 10	40 225 63	Halter UNITOMIC für Schiebegriffe höhenverstellbar links kpl.	1 St.
7a	40 225 52	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC rechts	1 St.
7b	40 225 53	Halter für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC links	1 St.
8	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32	2 St.
9	01 330 01	Schnorr-Scheibe NM 6	12 St.
10	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 – ISO 7380	4 St.
11a – 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b - 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff	2 St.

Rücken FIDIBUS mit Schiebegriffen höhenverstellbar

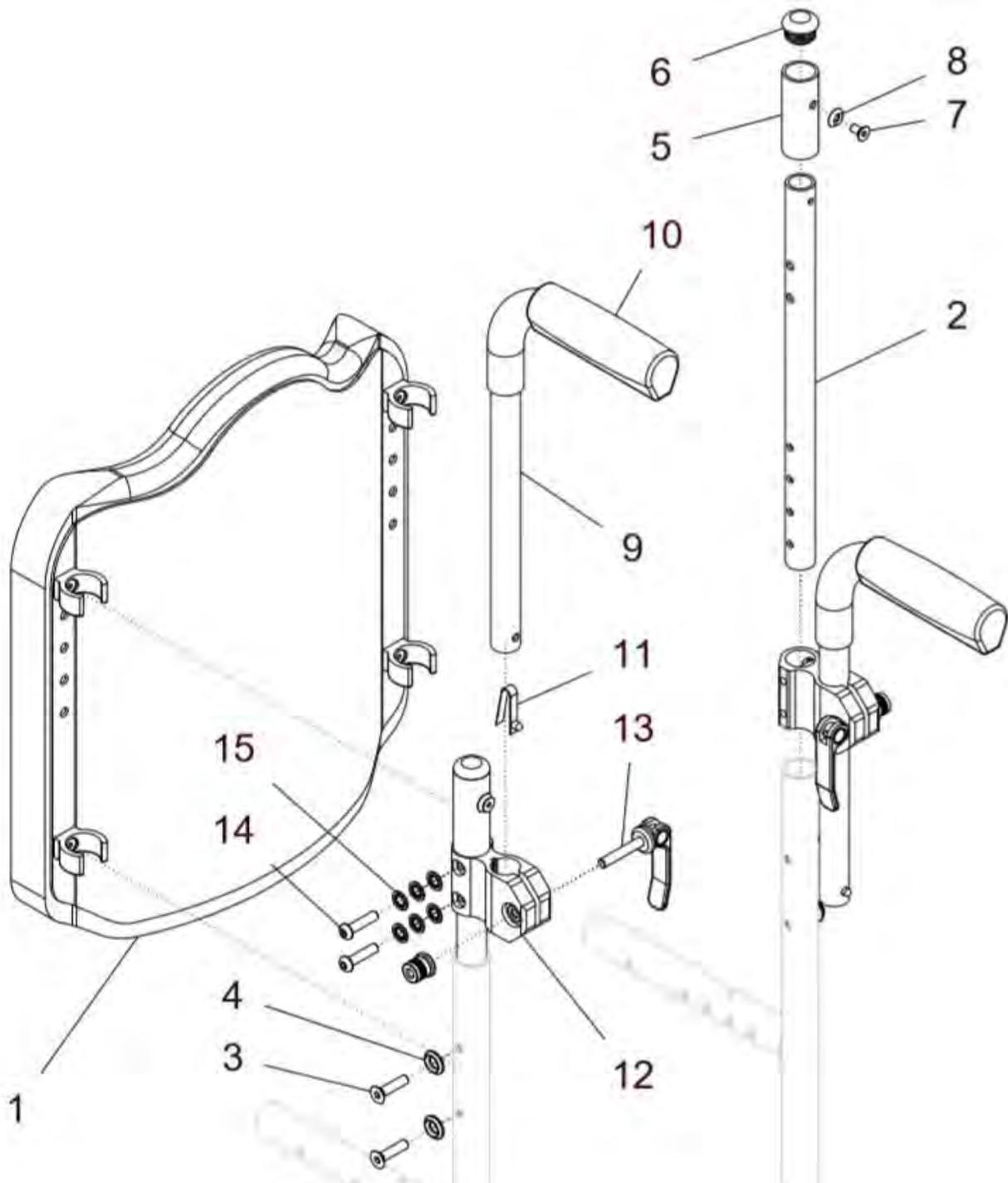


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 15	20 228 00	Rücken FIDIBUS 30 mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. Rücken FIDIBUS und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1b – 15	20 228 05	Rücken FIDIBUS 50 mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. Rücken FIDIBUS und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1c – 15	20 228 50	Rücken FIDIBUS <u>ASR 30</u> mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. Rücken FIDIBUS <u>ASR 30</u> und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1d – 15	20 228 55	Rücken FIDIBUS <u>ASR 50</u> mit Schiebegriffe höhenverstellbar kpl. Rücken FIDIBUS <u>ASR 50</u> und Rückenrohre mit Schiebegriffe höhenverstellbar RH: ? (RH 25 – 40) SB: ? (SB 24 – 36) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech) Trommelbremse: ? Seitenteile: ?	1 St.
1a	25 230 60	Rücken FIDIBUS 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1b	25 230 65	Rücken FIDIBUS 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.

1c	25 236 30	Rücken FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 30 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1d	25 238 30	Rücken FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 50 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
2 – 8	20 228 20	Rückenrohr mit Ausgleichrohr für Schiebegriffe höhenverst. kpl. mit Ausgleichrohr und Verschraubung RH: ? (RH 25 – 40) Seitenteil: ?	2 St.
2a	20 222 10	Rückenrohr gerade RH 25 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2b	50 222 11	Rückenrohr gerade RH 30 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2c	50 222 12	Rückenrohr gerade RH 35 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
2d	50 222 13	Rückenrohr gerade RH 40 für Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
3 – 4	50 211 00	Verbindungsteile für Rückenrohre kpl. Seitenteil: ?	2 St.
3a	01 120 13	Senkschraube - M6x25 - DIN 7991 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
3b	01 155 24	Linsenkopfschraube - M6x32 TZD TF - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Aluminium anschraubbar)	4 St.
3c	01 153 25	Linsenkopfschraube - M6x35 - ISO 7380 (nur bei Kleiderschutz Kunststoff anschraubbar)	4 St.
4a	01 350 04	Rosette 8,4 (nur bei Kleiderschutz steckbar)	4 St.
4b	01 322 02	Scheibe - 6,4 x 3 - DIN 7349 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
4c	01 321 02	Scheibe - 6,4 groß - DIN 9021 (nur bei Kleiderschutz Aluminium und Kunststoff anschraubbar)	4 St.
5	85 272 21	Ausgleichsrohr oben	2 St.
6	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23mm	2 St.
7	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 – DIN 966	2 St.
8	01 350 02	Rosette 5,3 – DIN 17670	2 St.
9a/b – 15	50 225 00	Schiebegriff höhenverstellbar kpl. Schiebegriffrohr mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	2 St.

9c/d – 15	50 225 02	Schiebegriff höhenverstellbar für Trommelbremse Schiebegriffrohr Trommelbremse mit Schiebegriffhalter Schiebegriffrohr: ? (150 / 350mm) Schiebegriffhalter: ?	kpl.	2 St.
9a – 11	50 225 10	Schiebegriffrohr standard mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9b – 11	50 225 16	Schiebegriffrohr lang mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9c – 11	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9d – 11	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse mit Griff und Stativfeder	kpl.	2 St.
9a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)		2 St.
9b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)		2 St.
9c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)		2 St.
9d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)		2 St.
10	04 200 01	Handgriff		2 St.
11	02 320 01	Stativfeder		2 St.
12a – 15	50 225 50	Schiebegriffhalter mit Verbindungsteilen	kpl.	2 St.
12b – 15	50 225 60	Schiebegriffhalter mit Buchse und Verbindungsteilen (Buchse für Stabi.-Stange oder Kopfstütze)	kpl.	2 St.
12c – 15	50 225 55	Schiebegriffhalter lang mit Verbindungsteilen (Schiebegriffhalter lang bei Desk-Seitenteilen)	kpl.	2 St.
12a	50 225 51	Schiebegriffhalter (standard)		2 St.
12b	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse		2 St.
12c	50 225 56	Schiebegriffhalter lang		2 St.
13	01 198 03	Schnellspannhebel M6 x 32		2 St.
14	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 - ISO 7380		4 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6		12 St.

Kopfstütze

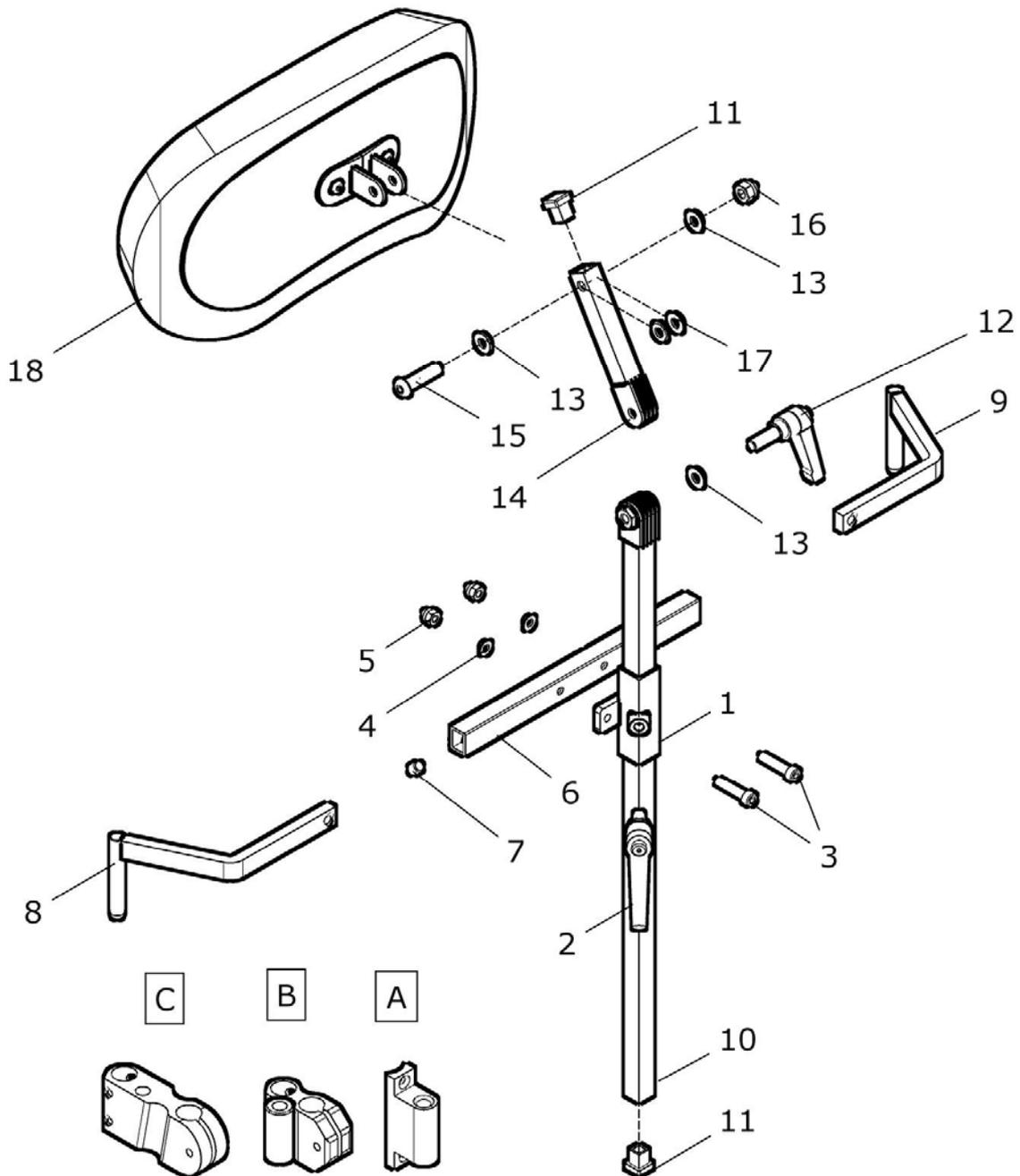

Befestigungsvarianten:

A: Rücken standard / UNITOMIC


B: Rücken standard mit Schiebegriffen höhenverstellbar / lang

C: Rücken UNITOMIC mit Schiebegriffen höhenverstellbar

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 8a, 9a - 18	20 262 00	Kopfstütze universal mit 1 Gelenk für Rücken gerade kpl. Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk für Rücken gerade SB: ? Befestigungsvariante: A oder B ???	1 St.
1 - 8b, 9b - 18	20 262 05	Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC Schgr. höh. kpl. für UNITOMIC-Rücken mit Schiebegriffe höhenverstellbar SB: ? für Befestigungsvariante: C	1 St.
1 - 8b 9b - 18	20 262 07	Kopfstütze 1 Gelenk für Rücken UNITOMIC kpl. für UNITOMIC-Rücken mit normalen Schiebegriffen SB: ? für Befestigungsvariante: A	1 St.
1 - 9	20 262 10	Kopfstützenquerstange gerade / UNITOMIC kpl (ohne Kopfstützenhalter winkelverstellbar) Rücken: gerade oder UNITOMIC ? SB: ?	1 St.
1	20 262 15	Führung Kopfstützenhalter	1 St.
2	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
3	01 160 75	Zylinderkopfschraube - M6x30 - DIN 912	2 St.
4	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125	2 St.
5	01 120 83	Hutmutter - M6 - DIN 986	2 St.
6	40 262 50	Führungsrohr SB: ?	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
8a	20 262 19	Haken kurz links (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
8b	40 262 13	Haken schräg links für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
9a	40 262 18	Haken kurz rechts (Variante A, B) (SB 24-36)	1 St.
9b	40 262 12	Haken schräg rechts für Rücken UNITOMIC (Variante A, C)	1 St.
10 - 18	20 262 70	Kopfstütze mit 1 Gelenk winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl. Kopfstütze Muschelform mit 1 Gelenk (ohne Querträger) SB: ?	1 St.
10 - 17	20 262 30	Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit Klemmhebel kpl. (ohne Kopfstütze Muschelform) SB: ?	1 St.
10a	20 262 24	Kopfstützenträger 500mm (bei Kopfstütze groß)	1 St.
10b	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm (bei Kopfstütze mini)	1 St.
11	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
12	01 190 02	Klemmhebel M8x25	1 St.
13	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 zns schwarz	3 St.
14	20 262 25	Kopfstützenhalterstück 90mm	1 St.


15	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 - ISO 7380 zns schwarz	1 St.
16	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns schwarz	1 St.
17	01 325 03	Scheibe Messing - 8,4 - DIN 125	2 St.
18a	20 262 20	Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.	1 St.
18a.1	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
18a.2	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
18b	20 262 50	Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.	1 St.
18b.1	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.
18b.2	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
A	20 262 11	Halter für Kopfstützenquerstange standard / UNITOMIC (rechts / links) verwendbar	2 St.
B1	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse (für Kopfstütze / Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
B2	50 225 56	Schiebegriffhalter lang (für Kopfstütze / Stabistange) (rechts / links) verwendbar	2 St.
C	40 225 52	Halter rechts für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC	1 St.
C	40 225 53	Halter links für Schiebegriff höhenverstellbar UNITOMIC	1 St.

Stabilisierungsstange / Schiebestange am Griff montiert

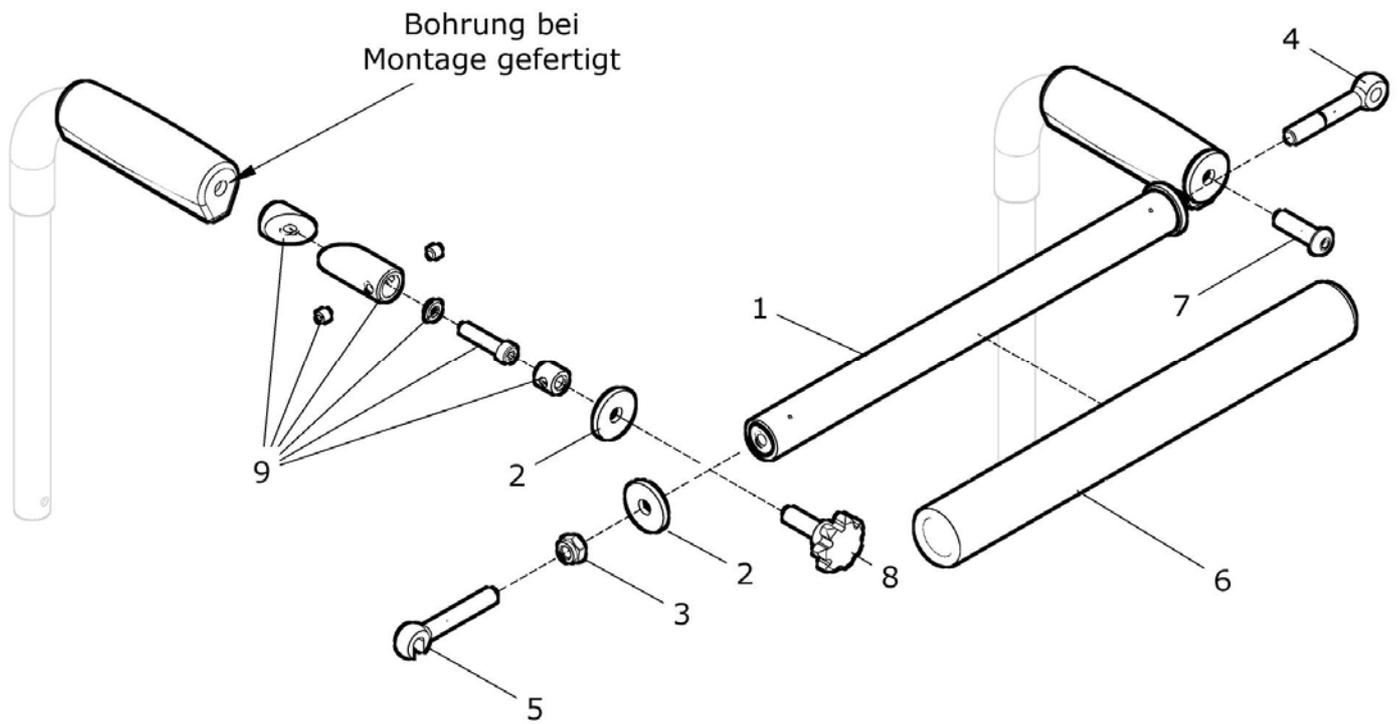


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 10	50 263 00	Stabilisierungs- / Schiebestange am Griff kpl. SB: ?	1 St.
1	50 263 10	Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2	01 321 13	Scheibe - 8,4 – DIN 9021	4 St.
3	01 210 14	Sechskantmutter - M8 – DIN 934	2 St.
4	01 180 15	Augenschraube M8x60	1 St.
5	01 180 99	Augenschraube mit Schlitz M8x60	1 St.
6	50 263 15	Rohrüberzug Schaumstoff für Schiebestange SB: ?	1 St.
7	01 152 41	Linsenkopfschraube - M8x30 - ISO 7380	1 St.
8	01 192 22	Sterngriffschraube M8x25	1 St.
9	20 271 10	Klemmteil mit Führung für Griff	2 St.

Stabilisierungsstange in Halter eingehängt

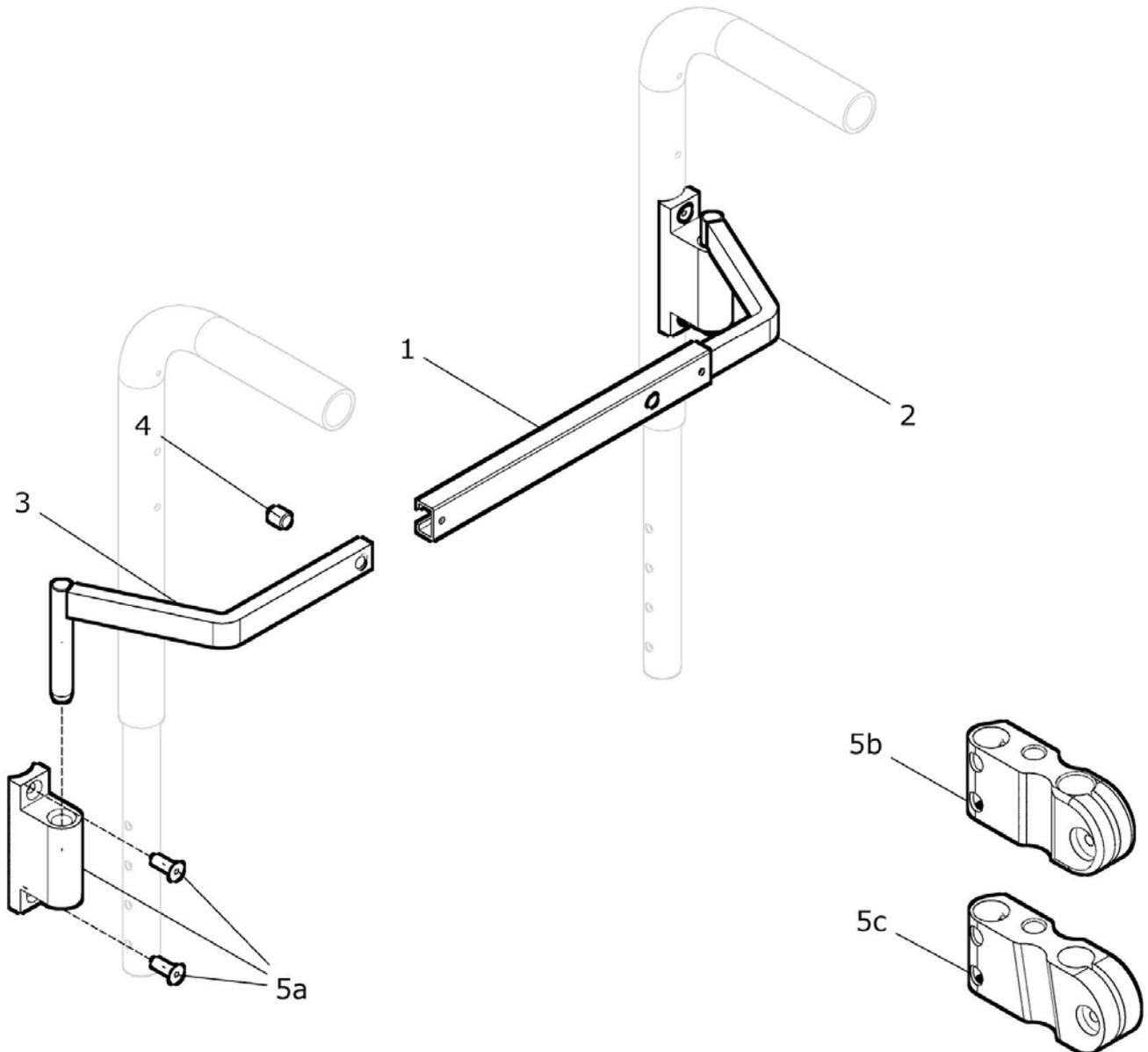


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	50 263 50	Stabilisierungsstange in Halter eingehängt kpl. Querstange-Führungsrohr mit Haken rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a – 5b) SB: ?	1 St.
1 - 4	40 263 50	Stabilisierungsstange in Halter eingehängt UNITOMIC kpl. Querstange-Führungsrohr mit Haken UNITOMIC rechts und links vorhandene Halter: ? (für 5a oder 5c) SB: ?	1 St.
1	50 263 60	Führungsrohr für Stabilisierungsstange SB: ?	1 St.
2a	20 262 18	Hacken kurz (rechts) (SB 24-36)	1 St.
2b	40 262 12	Hacken UNITOMIC (rechts)	1 St.
2c	40 262 18	Hacken kurz UNITOMIC (rechts)	1 St.
3a	20 262 19	Hacken kurz (links) (SB 24-36)	1 St.
3b	40 262 13	Hacken UNITOMIC (links)	1 St.
3c	40 262 19	Hacken kurz UNITOMIC (links)	1 St.
4	01 131 47	Gewindestift - M8x10 - DIN 913	2 St.
5a	20 262 11	Halter für Stabilisierungsstange standard / UNITOMIC	2 St.
o. Bild	50 225 61	Schiebegriffhalter mit Buchse	2 St.
5b	50 225 56	Schiebegriffhalter lang Schiebegriffe höhenverstellbar	2 St.
5c.1	40 225 52	Schiebegriffhalter UNITOMIC rechts f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.
5c.2	40 225 53	Schiebegriffhalter UNITOMIC links f. Schiebegriffe höhenverstellbar	1 St.

Halterung standard für MATRIX-Rückenblech

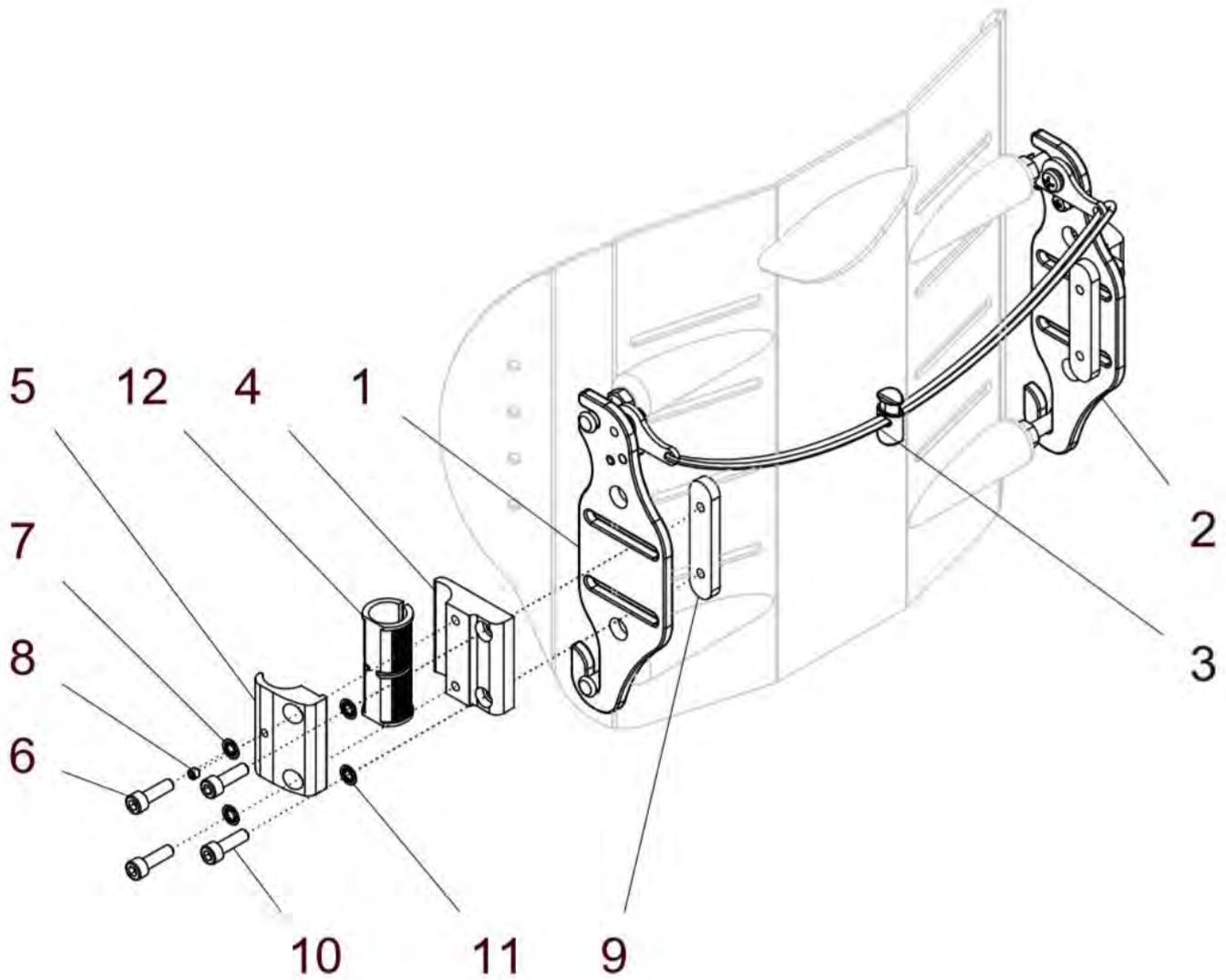

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11 (12)	S50 200 00	Halterung standard für MATRIX-Rücken kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	1 Paar
2, 4 – 11 (12)	S50 200 20	Halterung standard für MATRIX-Rücken rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm ?	1 St.
1, 4 – 11 (12)	S50 200 30	Halterung standard für MATRIX-Rücken links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	ß
1	S50 211 30	Aufnahmeplatte Rücken links kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 211 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
4 – 11	S50 212 05	Klemmhalter Ø23 innen / außen kpl. Klemmhalter Ø23 innen und außen und Anschraubstück rechts und links verwendbar	2 Set
4 – 8	S50 212 10	Klemmhalter Ø23 innen / außen (ohne Anschraubstück) kpl. Klemmhalter Ø23 innen und außen rechts und links verwendbar	2 Set
4	S50 212 12	Klemmhalter innen	2 St.
5	S50 212 11	Klemmhalter außen	2 St.
6	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
7	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
8	01 131 09	Gewindestift - M5x5 schwarz – DIN 914	2 St.
9	S50 212 13	Anschraubstück	2 St.
10	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
Optional:			
12	S50 212 15	Distanz-Klemmhülse Ø23/Ø18,7 -optional-	2 St.


Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rückenblech (Sonderhalterung)

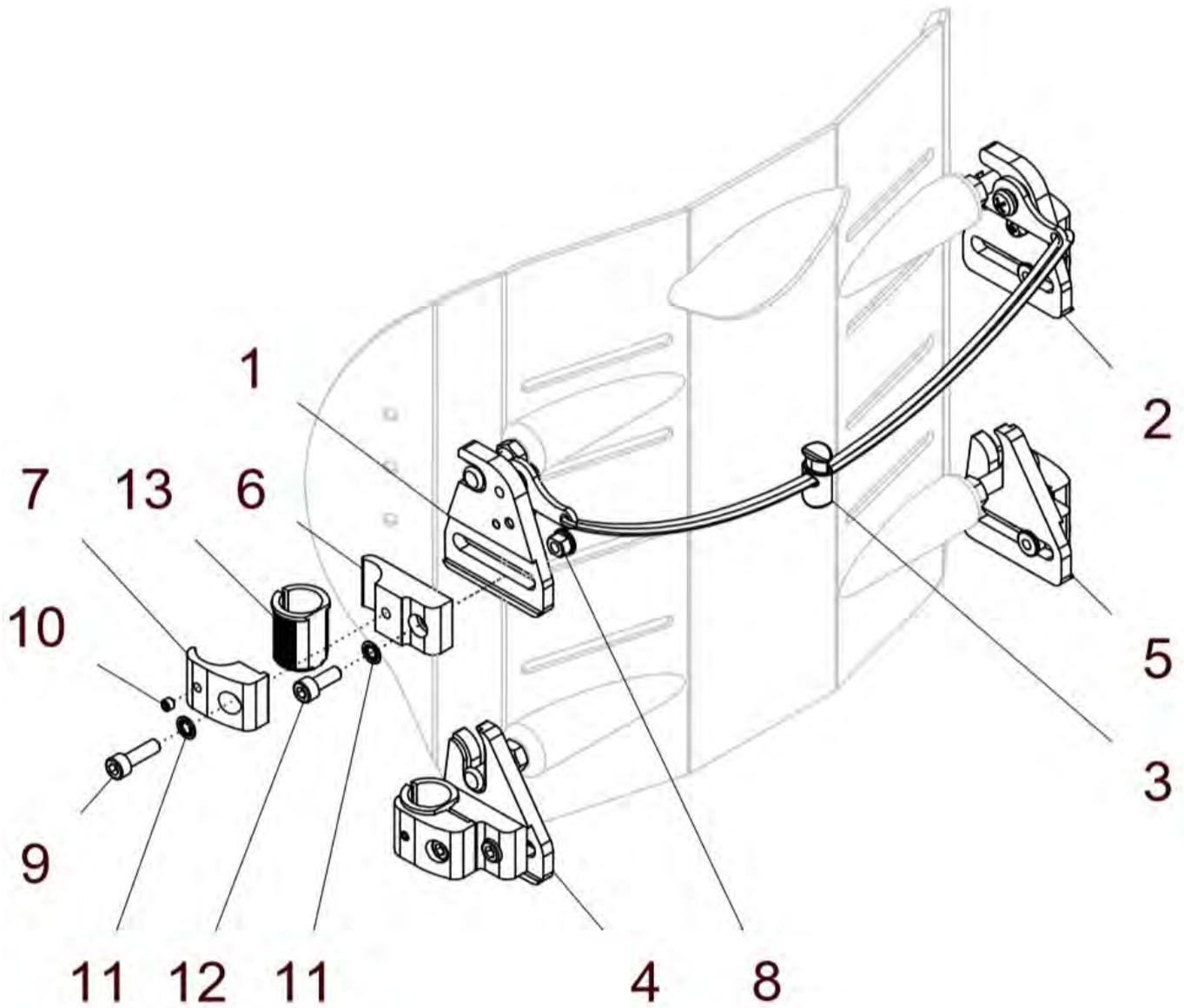

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	S50 300 00	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken kpl. mit Aufnahmeplatten und 2-teiliger Klemmhalterung (ohne Rücken) SB: ? Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 Paar
2, 5, 6 – 13	S50 300 20	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1, 4, 6 – 13	S50 300 30	Halterung geteilt (2-teilig) für MATRIX-Rücken links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung (ohne Rücken) Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
2, 6 – 13	S50 310 20	Halterung geteilt oben rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1, 6 – 13	S50 310 30	Halterung geteilt oben links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
1	S50 311 30	Aufnahmeplatte Rücken links oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
2	S50 311 20	Aufnahmeplatte Rücken rechts oben kpl. mit Verriegelung	1 St.
3	S50 211 80	Kordel 3mm schwarz mit Kordelklemme SB: ?	1 St.
5, 6 – 13	S50 310 40	Halterung geteilt unten rechts kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
4, 6 – 13	S50 310 50	Halterung geteilt unten links kpl. mit Aufnahmeplatten und Klemmhalterung Rücken-Rohrdurchmesser: 18,7 / 23mm	1 St.
4	S50 311 51	Aufnahmeplatte Rücken links unten	1 St.
5	S50 311 41	Aufnahmeplatte Rücken rechts unten	1 St.
6 – 12	S50 311 10	Klemmhalter Ø23 innen/ außen schmal kpl. rechts und links / oben und unten verwendbar	4 Set
6	S50 311 12	Klemmhalter innen schmal	4 St.
7	S50 311 11	Klemmhalter außen schmal	4 St.
8	S10 401 33	Gewindebolzen M6 / SW8	4 St.
9	01 162 18	Zylinderkopfschraube – M6x20 schwarz – DIN 912	4 St.
10	01 131 09	Gewindestift - M5x5 schwarz – DIN 914	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	8 St.
12	01 162 17	Zylinderkopfschraube – M6x16 schwarz – DIN 912	4 St.


6 – 13	S50 311 15	Klemmhalter Ø18,7 innen/ außen schmal kpl. rechts und links / oben und unten verwendbar	4 Set
optional:			
13	S50 311 16	Distanz-Klemmhülse halbiert Ø23/Ø18,7 für Halterung geteilt	4 St.

Matrix-Aktiv Rücken

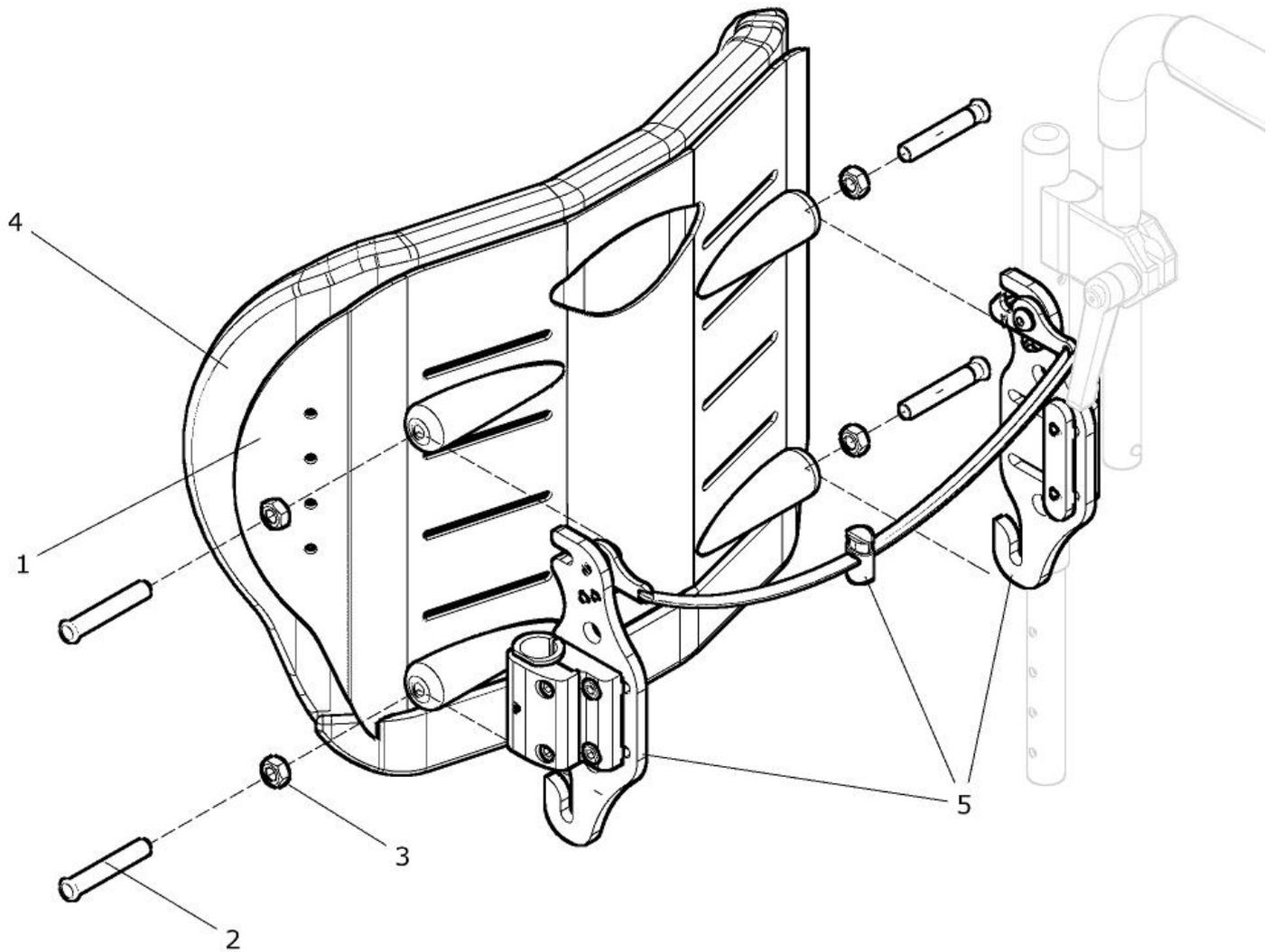

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	S51 200 00	MATRIX-Aktiv Rücken mit Rückenpolster und Halterung kpl. und mit Aufnahmeplatte und Klemmhalter Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (32, 34, 36) RH: ? (25, 30, 40) Halterung: ? (standard S502HALT / geteilt S503HALT) Halterung siehe Artikel-Nr. S502HALT oder S503HALT	1 St.
1 – 3	S51 400 00	MATRIX-Aktiv Rückenblech ohne Polster / ohne Halterung kpl. Rückenblech mit Gewindebolzen und Mutter (ohne Rückenpolster / ohne Halterung) SB: ? (32, 34, 36) RH: ? (25, 30, 40)	1 St.
1	S51 800 00	Rückenblech MATRIX-Aktiv- schwarz pulverbeschichtet (ohne Gewindebolzen und Mutter) SB: ? (32, 34, 36) RH: ? (25, 30, 40)	1 St.
2	S51 101 01	Gewindebolzen M8x1	4 St.
3	01 212 54	Mutter - M8x1 - DIN 934 schwarz vz.	4 St.
4	S51 700 00	MATRIX-Aktiv Rückenpolster atmungsaktiv Farbe Bezug 1 (innen): Stoff 75 schwarz Farbe Bezug 2 (außen): ? SB: ? (32, 34, 36) RH: ? (25, 30, 40)	1 St.
5	S502HALT	Halterung standard MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl. Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! Ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung standard S50 200 00	1 Paar
	Sonderhalterung:		
o. Bild	S503HALT	Halterung geteilt (2-teilig) MATRIX-Rücken Ø18,7/23 kpl. Hinweis: Nur in Verbindung mit Rücken S51 200 00 bestellbar !! ansonsten als Ersatzteil siehe Halterung geteilt S50 300 00	1 Paar


Kopfstütze für Matrix-Aktiv Rücken

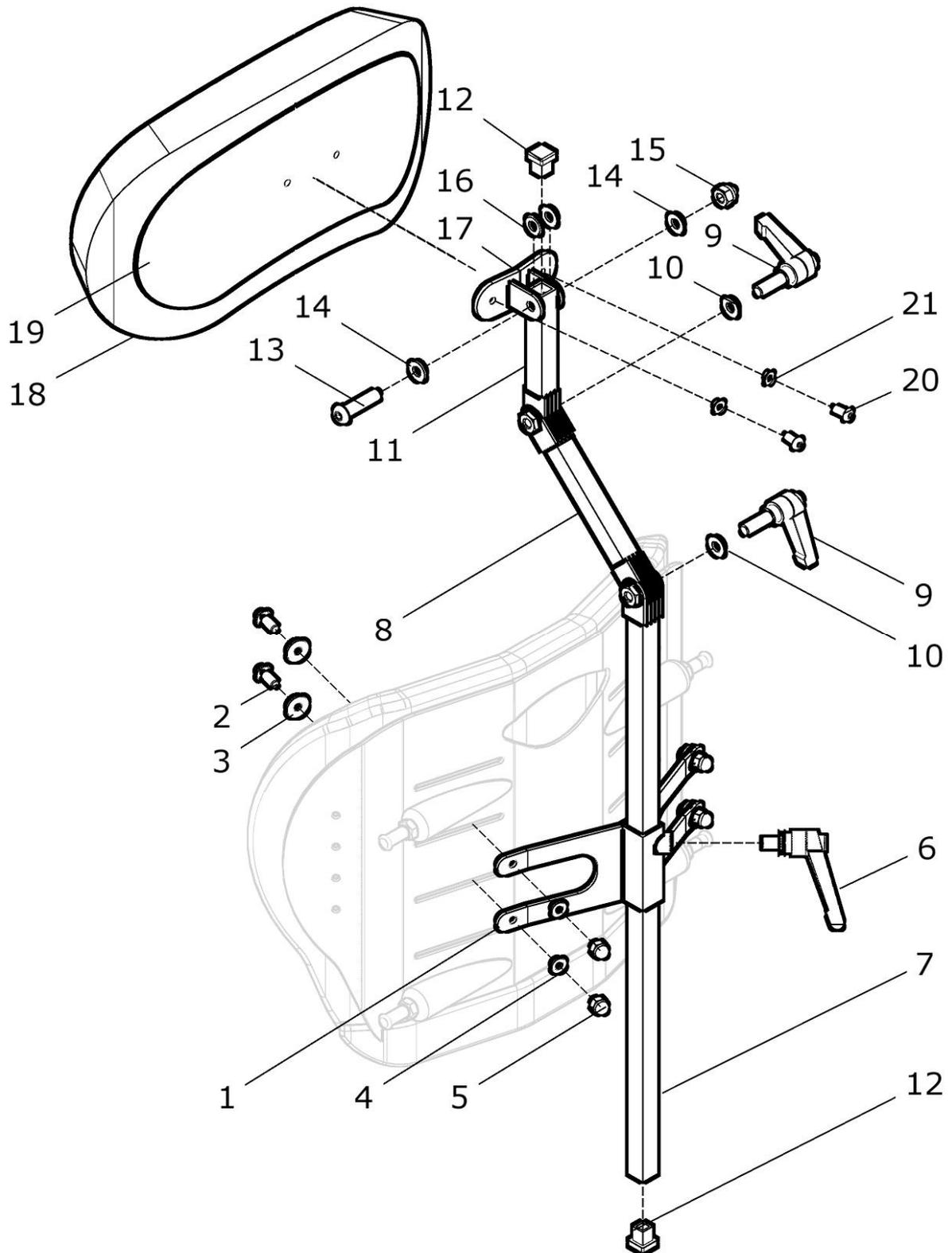

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	S51 320 00	Kopfstütze mit Bezug und Halterung für Matrix-Aktiv kpl. mit Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenken SB: ? (bzw. Halterung: ?)	1 Set
1 - 6	S51 321 09	Adapter für Kopfstütze für Matrix-Aktiv-Rücken kpl. SB: ? (bzw. Halterung: ?)	1 St.
1a	S51 321 11	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 32-40	1 St.
1b	S51 321 12	Halterung Kopfstütze am Matrix-Aktiv Rücken SB 42-50	1 St.
2	01 153 20	Linsenschraube M6x14 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	4 St.
6	01 190 00	Klemmhebel M8x15	1 St.
7 - 16	20 262 45	Kopfstützenhalter winkelverstellbar mit 2 Gelenk - 300mm kpl. (ohne Kopfstütze Muschelform / ohne Halter Kopfstützenschale)	1 St.
7	20 262 61	Kopfstützenträger 300mm	1 St.
8	20 262 41	Gelenkzwischenstück für Kopfstützenträger	1 St.
9	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
10	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
11	20 262 25	Kopfstütze Halterstück	1 St.
12	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15	2 St.
13	01 154 42	Linsenschraube M8x35 - ISO 7380 ZNS	1 St.
14	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
15	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 ZNS	1 St.
16	01 325 03	Scheibe Messing 8,4 - DIN 125	2 St.
17, 18a - 21	20 262 20	Kopfstütze Muschelform groß mit Bezug (ab SB 38cm) kpl.	1 St.
17	20 262 23	Halter für Kopfstützenschale	1 St.
18a	20 262 82	Kopfstützenbezug groß (Skai 28 schwarz)	1 St.
19a	20 262 22	Kopfstütze Muschelform groß (ohne Bezug)	1 St.
20	01 156 54	Linsenschraube M5x12 - ISO 7380F ZNS	2 St.
21	01 320 61	Scheibe 5,3 - DIN 125 ZNS	2 St.


17, 18b – 21	20 262 50	Kopfstütze Muschelform mini mit Bezug (bis SB 36cm) kpl.	1 St.
18b	20 262 87	Kopfstützenbezug mini (Skai 28 schwarz)	1 St.
19b	20 262 52	Kopfstütze Muschelform mini (ohne Bezug)	1 St.

Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken

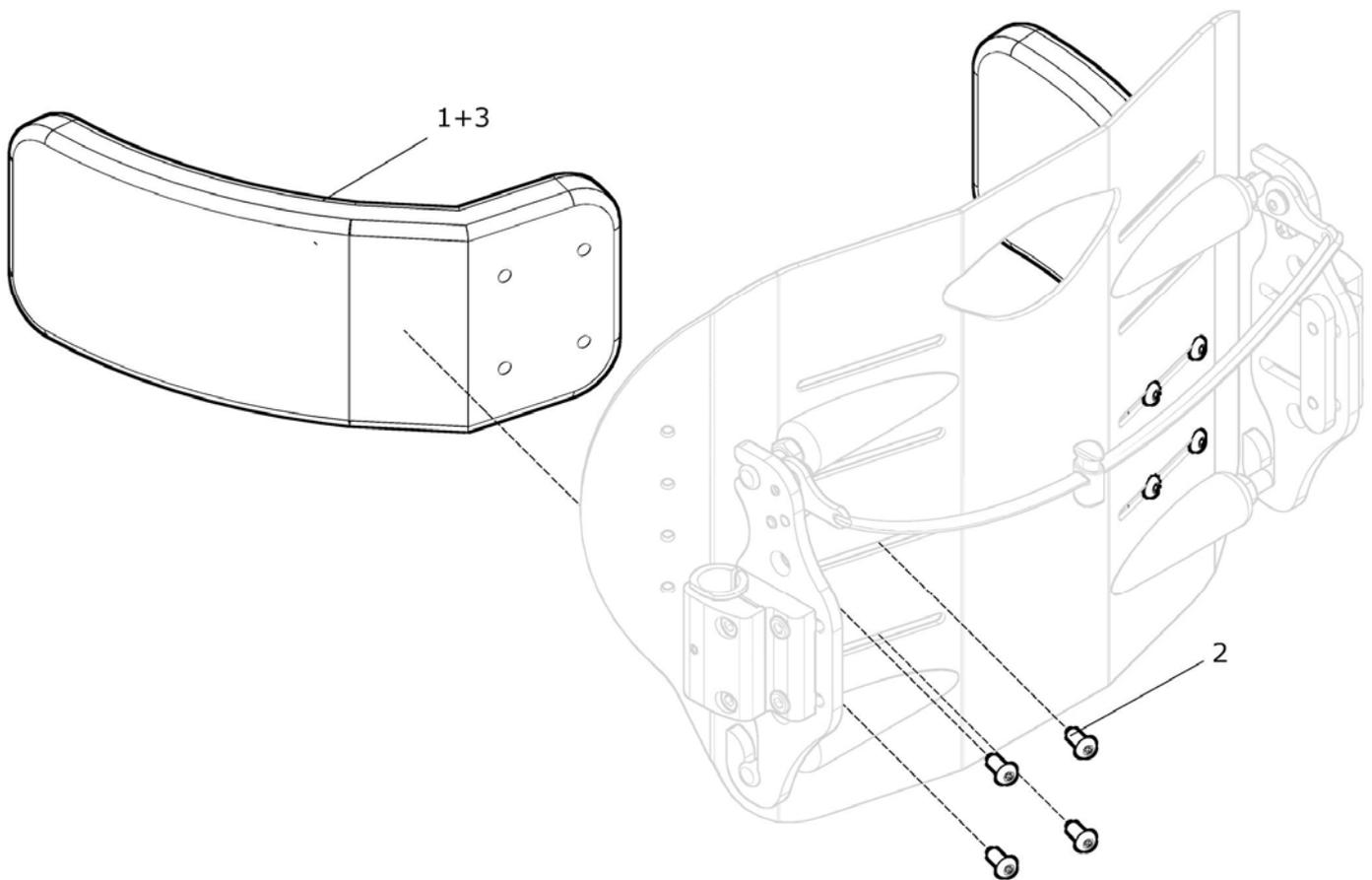

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	S51 301 01	Seitenpelotten gerade für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW)	1 Paar
1	S51 311 00	Seitenpelotte gerade (ohne Bezug)	2 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3	S51 311 81	Bezug Seitenpelotte gerade (rechts / links verwendbar) FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	2 St.

Seitenpelotten abgekröpft für Matrix-Aktiv Rücken

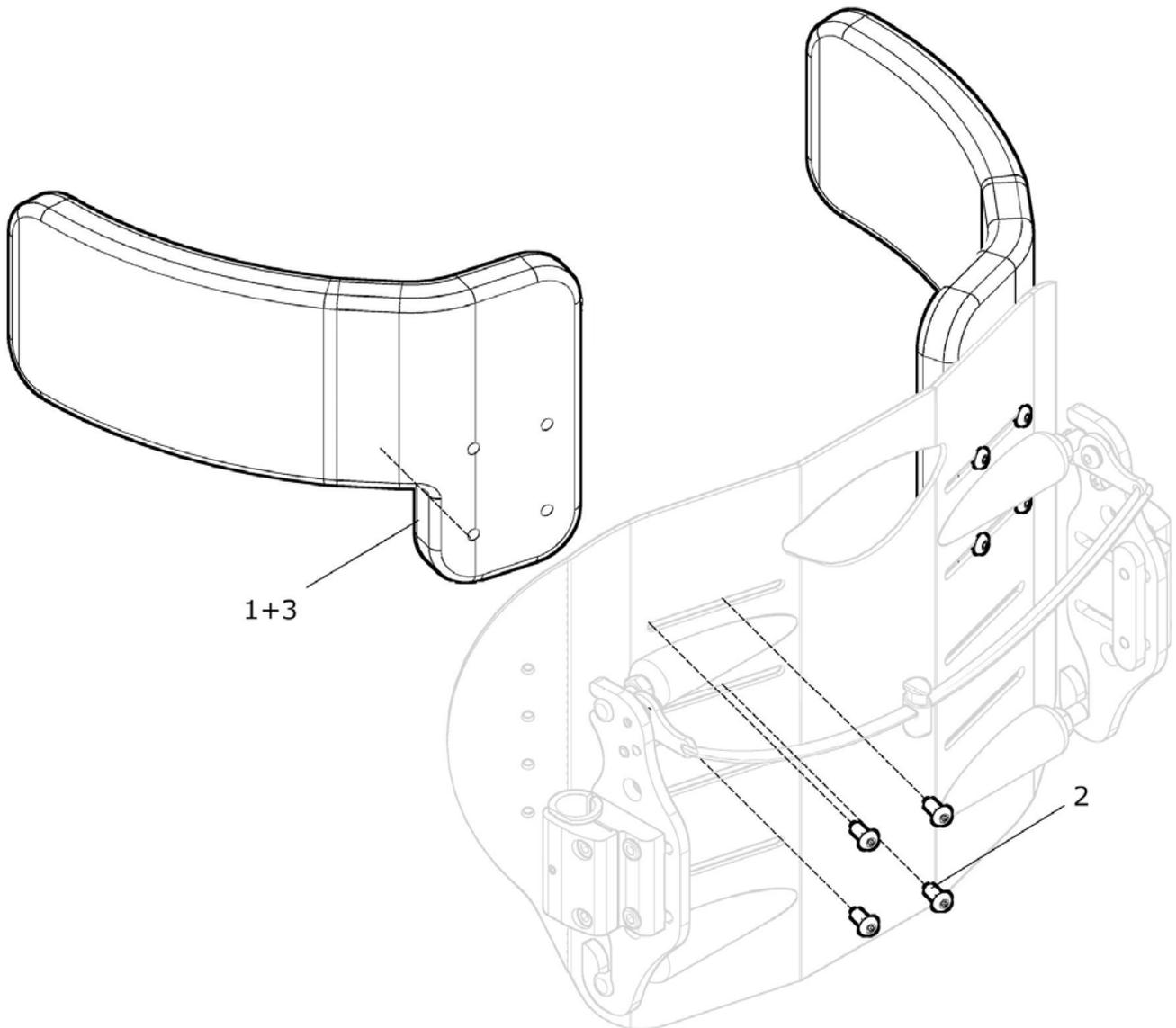


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	S51 312 00	Seitenpelotten abgekröpft rechts / links Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (rechts = nach oben versetzt) (links = nach oben versetzt)	1 Paar
1a – 3a	S51 312 02	Seitenpelotten abgekröpft rechts für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (rechts = nach oben versetzt)	1 St.
1b – 3b	S51 312 03	Seitenpelotten abgekröpft links für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Bezug schwarz Stoff 75 (AGW) (links = nach oben versetzt)	1 St.
1a	S51 312 20	Seitenpelotte abgekröpft rechts (ohne Bezug)	1 St.
1b	S51 312 30	Seitenpelotte abgekröpft links (ohne Bezug)	1 St.
2	01 156 54	Linsenschraube M5x12 – schwarz - ISO 7380F	8 St.
3a	S51 311 28	Bezug Seitenpelotte abgekröpft rechts FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.
3b	S51 311 38	Bezug Seitenpelotte abgekröpft links FB: schwarz Stoff 75 (AGW)	1 St.

Hinweis:

Die Seitenpelotten rechts und links können auch vertauscht werden (=> nach unten versetzt) !!


Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken

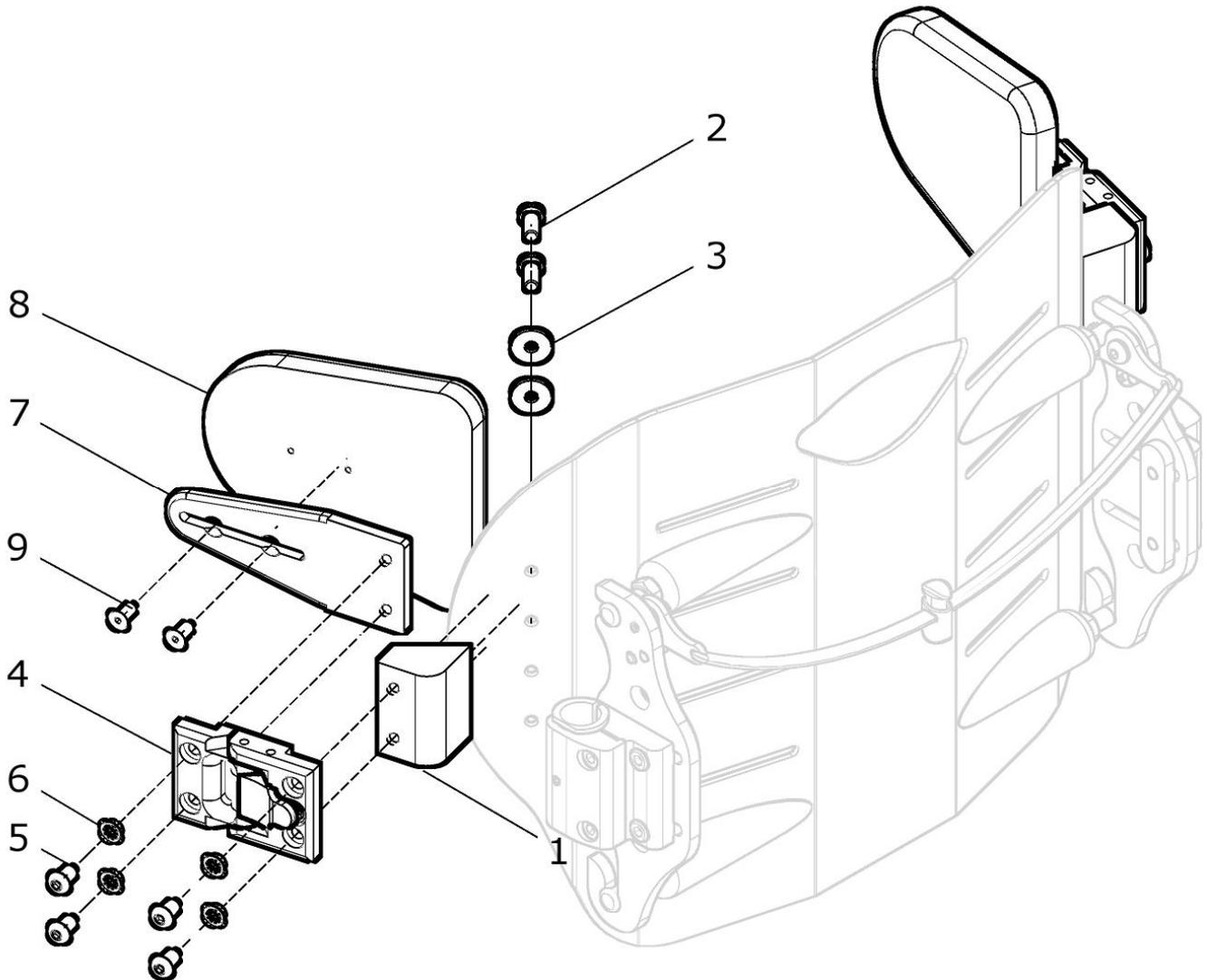

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 9	S51 331 00	Seitenpelotten abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken kpl. mit Gelenk flach Größe Pelotten: 1 oder 2 ?	1 Paar
1	S50 501 12	Verbindungsteil für Seitenpelotte abklappbar für Matrix-Aktiv Rücken	2 St.
2	01 152 21	Linsenschraube M6x16 - ISO 7380	4 St.
3	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
4	S10 501 20	Gelenk Seitenpelottenhalter flach abklappbar	2 St.
5	01 154 19	Linsenschraube M6x10 schwarz - ISO 7380	8 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	8 St.
7	S10 501 41	Pelottenschiene gerade Pelottenhalter flach	2 St.
8a	S10 402 10	Seitenpelotten standard Gr. 1 mit Bezug (bis SB 36) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
8b	S10 403 10	Seitenpelotten standard Gr. 2 mit Bezug (ab SB 38) FB: schwarz (Skai S18)	2 St.
9	01 120 02	Senkschraube M5x12 - DIN 7991	4 St.

Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken

(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)

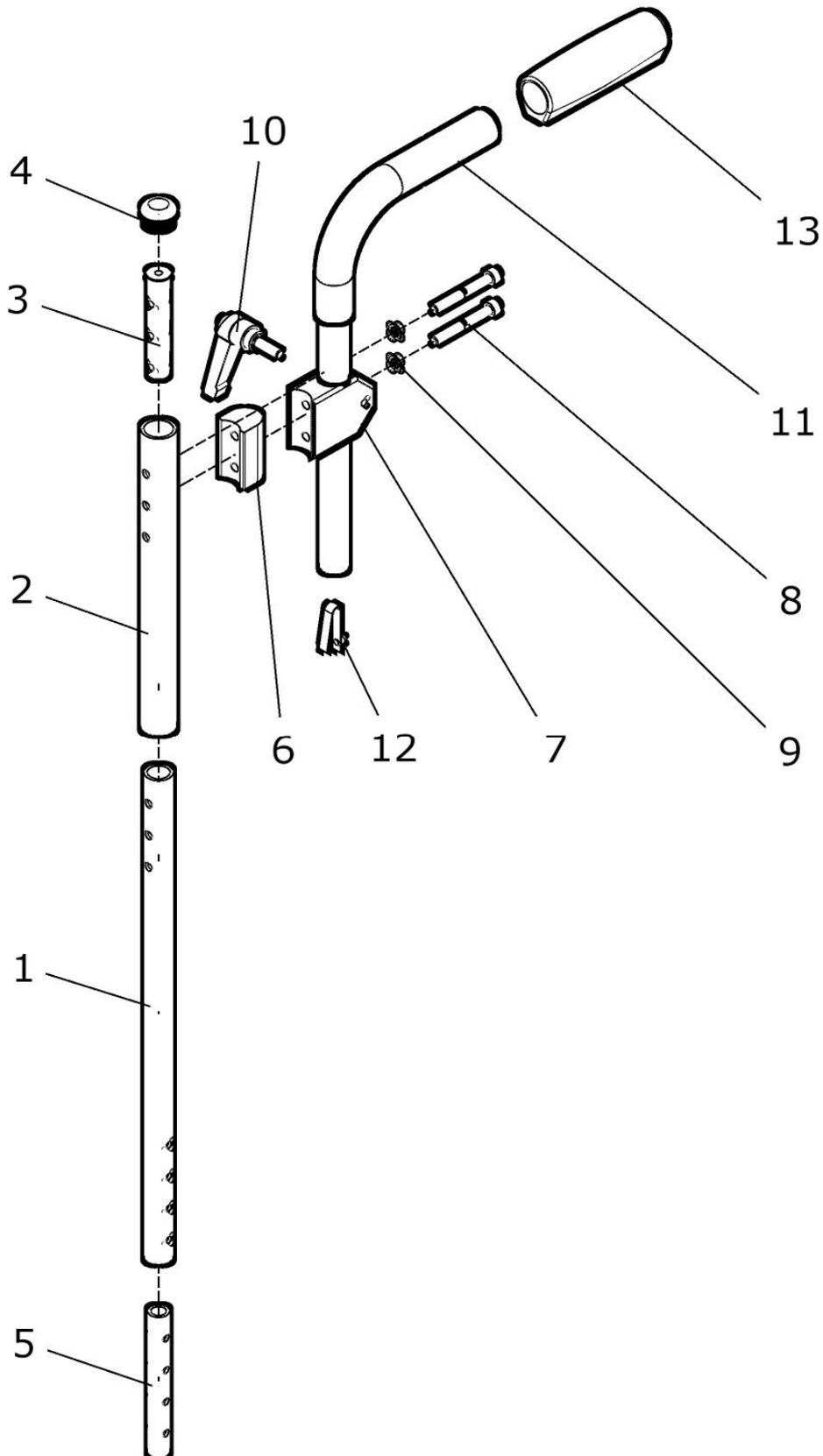

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	50 228 00	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	1 Paar
1 - 10	50 228 20	Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1 - 10	50 228 30	Rückenrohr links für Schiebegriffe höh. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1a	50 228 52	Rückenrohr Matrix innen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1b	50 228 53	Rückenrohr Matrix innen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1c	50 228 54	Rückenrohr Matrix innen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
1d	50 228 55	Rückenrohr Matrix innen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr	2 St.
6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a - 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b - 13	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11c - 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11d - 13	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.

11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.


Verstärkte Version:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 13	50 228 05	Rückenrohr <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken Rückenrohre verstärkt (Stahl) mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	kpl. 1 Paar
1 - 10	50 228 25	Rückenrohr rechts <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	kpl. 1 Stck
1 - 10	50 228 35	Rückenrohr links <u>verstärkt</u> für Schiebegriffe höhverst. für Matrix-Rücken Rückenrohr verstärkt (Stahl) mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	kpl. 1 Stck
1e	50 228 52	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 30 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1f	50 228 53	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 35 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1g	50 228 54	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 40 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
1h	50 228 55	Rückenrohr Matrix verstärkt innen RH 45 für Schiebegriff höhenver.	2 St.
2a	50 228 42	Rückenrohr Matrix außen RH 30 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2b	50 228 43	Rückenrohr Matrix außen RH 35 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2c	50 228 44	Rückenrohr Matrix außen RH 40 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
2d	50 228 45	Rückenrohr Matrix außen RH 45 für Schiebegriff höhenverst.	2 St.
3	50 228 01	Bolzen für Matrix - Rücken	2 St.
4	04 210 02	Verschlußstopfen Ø23x2mm	2 St.
5	50 122 09	Verstärkungsrohr # nicht bei verstärkter Version #	

6	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
7	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
8	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
9	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
10	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
11a – 13	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11b – 13	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11c – 13	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11d - 13	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
11a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
11c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
11d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
12	02 320 01	Stativfeder	2 St.
13	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.


Rückenrohr mit Schiebegriffe höhenverstellbar für Matrix-Rücken bei Rücken mit Zahnsegmenten

(Sonderrückenrohr für Montage der Matrix-Halterung)

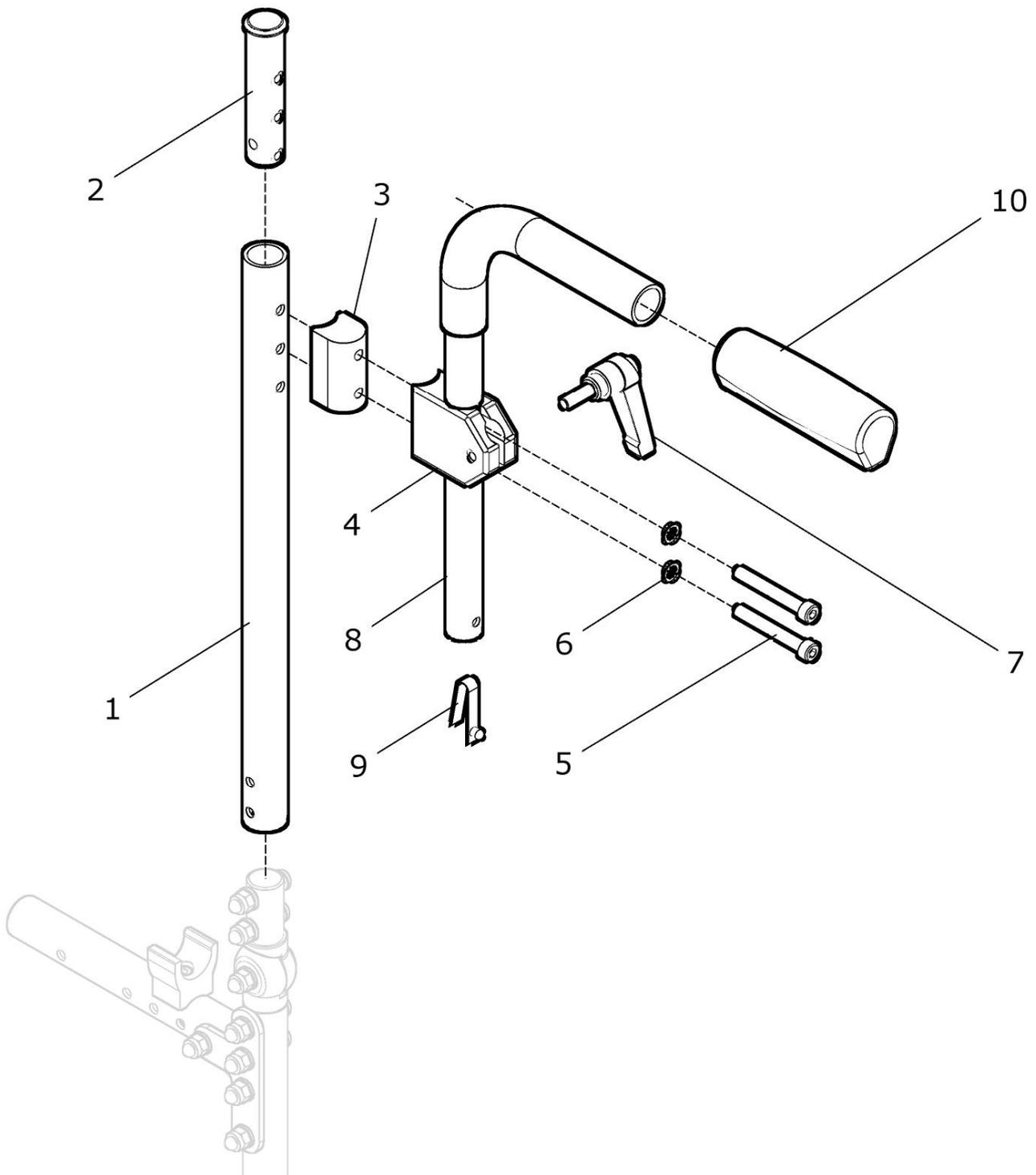


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 10	50 229 00	Rückenrohr für Schiebegriffe höhenverst. für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohre mit Sonder-Rückenrohr außen für Montage Halterung Matrix-Rücken RH: ? Tr.br.: ? Schiebegriffe: ?	1 Paar
1 – 7	50 229 20	Rückenrohr rechts für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1 – 7	50 229 30	Rückenrohr links für Schiebegriffe höhenver. / Zahnsegmente für Matrix-Rücken kpl. Rückenrohr mit Schiebegriffhalter (ohne Schiebegriffe höhenverstellbar) RH: ?	1 Stck
1	50 229 40	Rückenrohr Matrix außen RH .. ? bei Schiebegriffe höhenverstellbar und Zahnsegmente (RH 30 / 35 / 35 / 45)	2 St.
2	25 222 01	Bolzen für Schiebegriffhalter	2 St.
3	U25 225 22	Versatzstück 20mm	2 St.
4	U25 225 21	Schiebegriffhalter TRAXX	2 St.
5	01 160 28	Zylinderkopfschraube - M6x50 – DIN 912	4 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
7	01 190 12	Klemmhebel M6x20	2 St.
8a – 10	50 225 10	Schiebegriffrohr standard kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8b – 10	50 225 16	Schiebegriffrohr lang kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8c – 10	50 225 20	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8d - 10	50 225 26	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse kpl. mit Handgriff und Stativfeder	2 St.
8a	50 225 11	Schiebegriffrohr standard (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8b	50 225 19	Schiebegriffrohr lang (350mm höhenverstellbar)	2 St.
8c	50 225 21	Schiebegriffrohr standard für Trommelbremse (150mm höhenverstellbar)	2 St.
8d	50 225 29	Schiebegriffrohr lang für Trommelbremse (350mm höhenverstellbar)	2 St.
9	02 320 01	Stativfeder	2 St.
10	04 200 01	Handgriff schwarz	2 St.

Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS - mit Clips

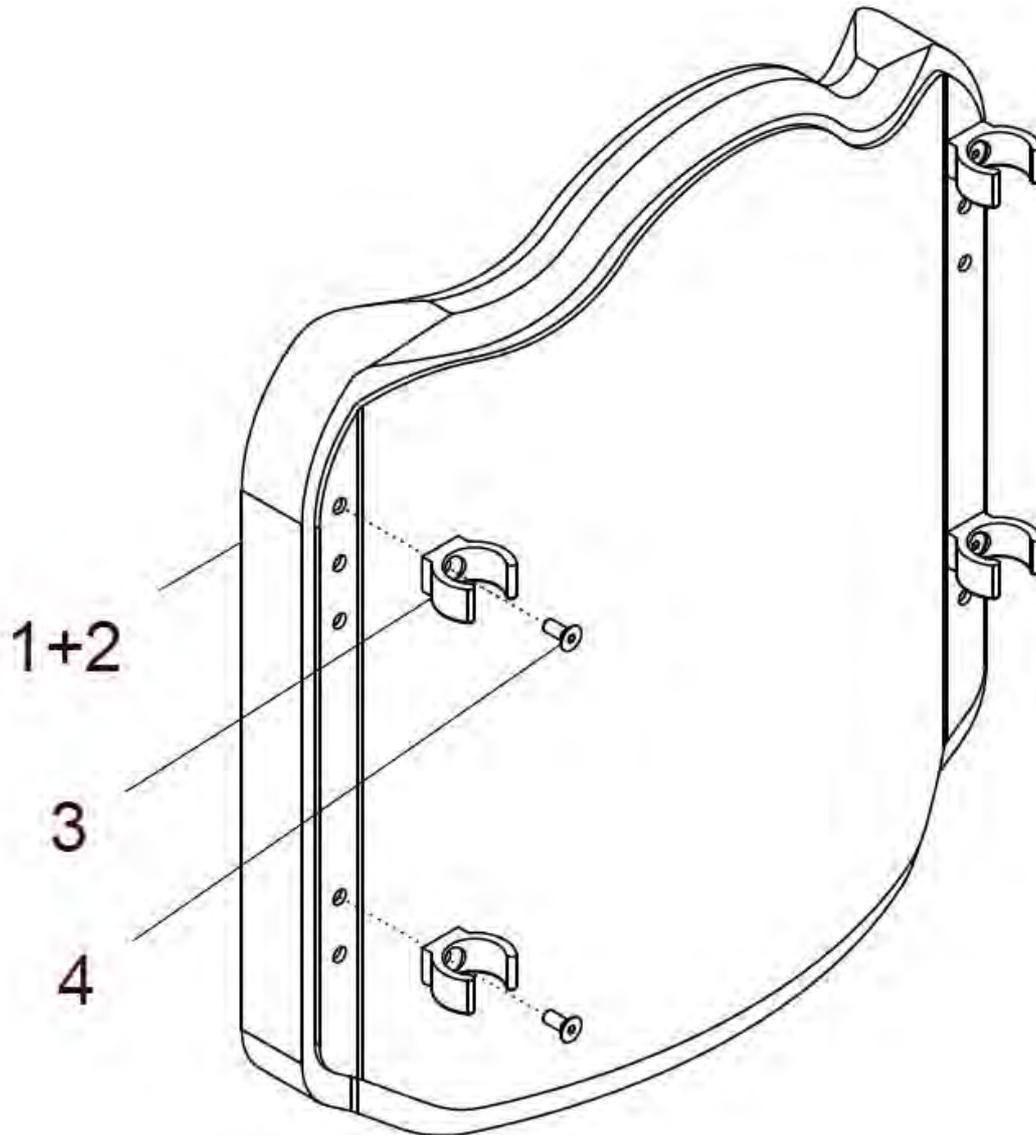

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a - 4	25 230 60	Rücken FIDIBUS 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
1b, 2b - 4	25 230 65	Rücken FIDIBUS 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 mit Clips und mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
1a	25 231 60	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 30 (für Clips) Rückenblech 30mm gemuldet (ohne Bezug) SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40)	1 St.
1b	25 231 65	Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS 50 (für Clips) Rückenblech 50mm gemuldet (ohne Bezug) SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40)	1 St.
2a	25 231 81	Bezug für Rücken FIDIBUS 30 angeschraubt SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
2b	25 231 86	Bezug für Rücken FIDIBUS 50 angeschraubt SB: ? (SB 24 - 36) RH: ? (RH 25 - 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW-Stoff ...)	1 St.
3a	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 25cm)	2 St.
3b	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 30 - 40cm)	4 St.
4a	01 120 02	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 A2 (RH 25cm)	2 St.
4b	01 120 02	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 A2 (RH 30 - 40cm)	4 St.

Anatomisch geformter Rücken FIDIBUS-ASR - mit Clips

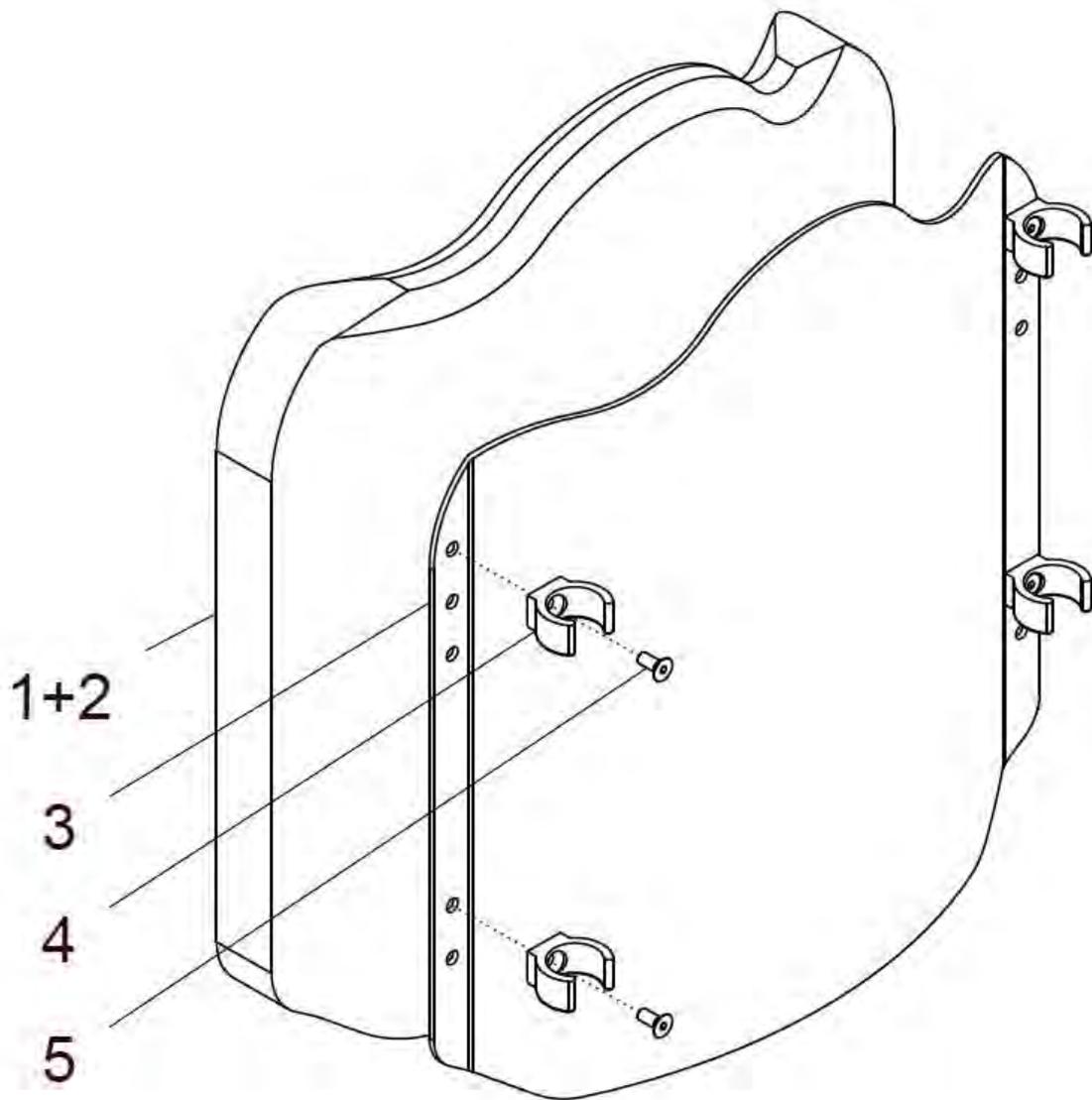


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 2a 3 – 5	25 236 30	Rücken FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 30 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1b, 2b, 3 – 5	25 238 30	Rücken FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle kpl. Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips und mit anatomisch geformtem Rückenpolster ASR 50 mit atmungsaktivem Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
1a, 2a	25 236 50	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 mit Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1b, 2b	25 238 50	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 mit Bezug SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
1a	25 236 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR 30 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
1b	25 238 51	Anatomisch geformtes Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 (ohne Bezug) für Rücken FIDIBUS ASR 50 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40)	1 St.
2a	25 236 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR 30 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
2b	25 238 81	Bezug für Rückenpolster FIDIBUS-ASR 50 SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FB: ? (Bespannungsstoff: AGW–Stoff ...)	1 St.
3a - 5	25 236 35	Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 mit Clips für Faltrollstühle Rückenblech pulverbeschichtet (30mm gemuldet) mit Clips (ohne Polster) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.


3b - 5	25 238 35	Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 mit Clips für Faltrollstühle Rückenblech pulverbeschichtet (50mm gemuldet) mit Clips (ohne Polster) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3a	25 236 96	Rückenblech FIDIBUS-ASR 30 für Faltrollstühle (für Clips) Rückenblech pulverbeschichtet (30mm gemuldet) (ohne Polster / ohne Clips) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3b	25 238 96	Rückenblech FIDIBUS-ASR 50 für Faltrollstühle (für Clips) Rückenblech pulverbeschichtet (50mm gemuldet) (ohne Polster / ohne Clips) SB: ? (SB 24 – 36) RH: ? (RH 25 – 40) FM: ? (Rückenblech)	1 St.
3a	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 25cm)	2 St.
3b	A20 231 02	Clip d=22 / 23 halb (RH 30 - 40cm)	4 St.
4a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 25cm)	2 St.
4b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 (RH 30 – 40cm)	4 St.

Sitz

Gruppe 3

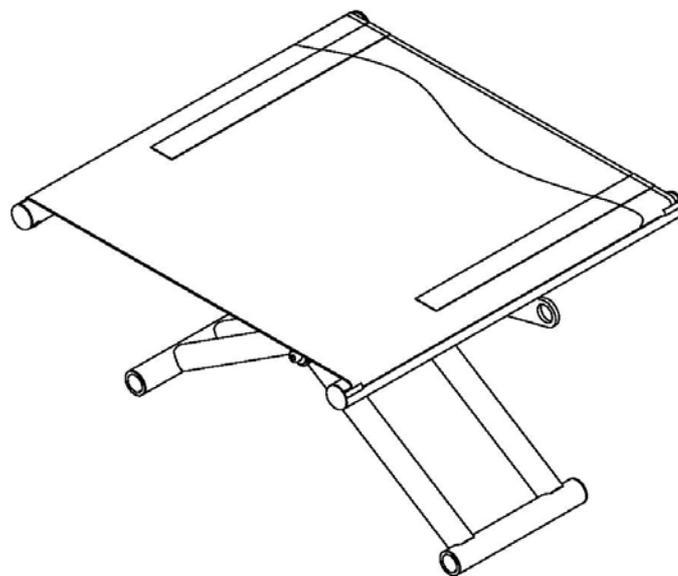


Sitz (Kreuzstrebe mit Bespannung) LITTLE

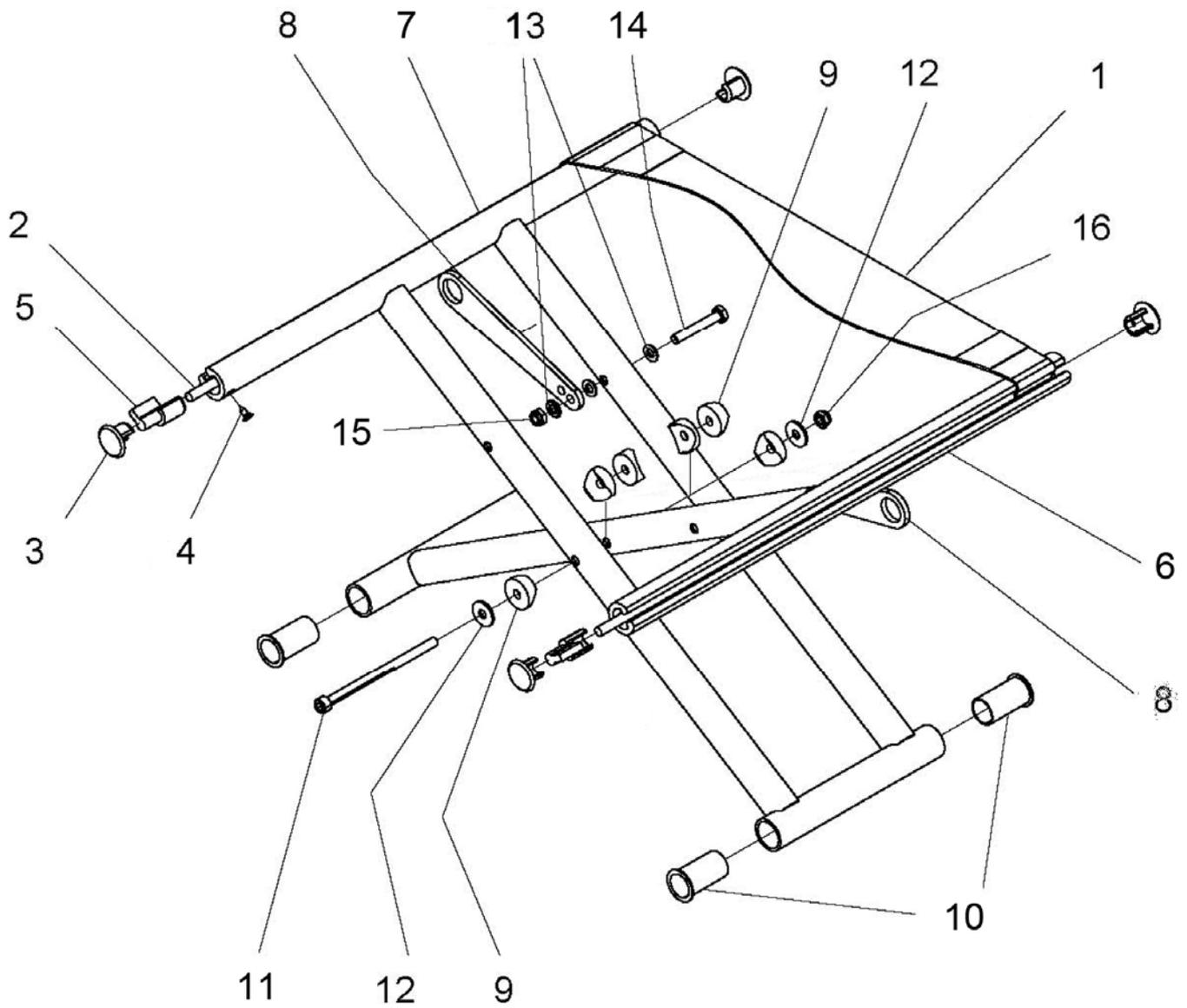

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	22 300 50	Sitz LITTLE SLT SB 24-36; ST 26-38 kpl. (Sitzbespannung und Kreuzstrebe) SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	1 St.
1 – 15	22 300 60	Sitz LITTLE AR SB 24-36; ST 26-38 kpl. (Sitzbespannung und Kreuzstrebe) SB: ? ST: ? FM: ? FB: ?	1 St.
1 – 5	22 310 00	Sitzbespannung LITTLE / JUNIOR2 kpl. SB: ? ST: ? FB: ?	1 St.
1	22 312 00	Sitzbespannung LITTLE / JUNIOR2 SB: ? ST: ? FB: ?	1 St.
2	50 331 01	Spannstab 6mm ST: ?	2 St.
3	90 321 09	Stopfen Sitzrohr	4 St.
4	01 128 02	Blechschrabe 3.5x9.5	4 St.
5	90 321 11	Distanz Sitzrohr (20mmm) Stückzahl je nach Bedarf	2 St.
6a, 7a – 15	22 320 50	Kreuzstrebe LITTLE SLT SB 24-36; ST 26-38 kpl. (linke und rechte Seite) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
6b, 7b – 15	22 320 60	Kreuzstrebe LITTLE AR SB 24-36; ST 26-38 kpl. (linke und rechte Seite) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
6a	22 322 00	Kreuzstrebe SLT rechts (Kreuzrohr einfach) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
6b	22 322 60	Kreuzstrebe AR rechts (Kreuzrohr einfach) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
7a	22 323 00	Kreuzstrebe SLT links (Kreuzrohre doppelt) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.
7b	22 323 60	Kreuzstrebe AR links (Kreuzrohre doppelt) SB: ? ST: ? FM: ?	1 St.


8a	22 321 03	Kreuzstrebenlasche SB 24 / 28	2 St.
8b	22 321 02	Kreuzstrebenlasche SB 26 / 30	2 St.
8c	22 321 01	Kreuzstrebenlasche klein SB 32	2 St.
8d	50 321 01	Kreuzstrebenlasche SB 34 - 36	2 St.
9	50 321 11	Halbschale 6,2 für Kreuzstrebe	6 St.
10	50 321 12	Buchse	1 St.
11	01 160 32	Zylinderschraube DIN 912 M6x100	1 St.
12	01 321 02	Scheibe DIN 9021 groß 6,4	2 St.
13	01 310 02	Scheibe DIN 125 6,4 Poly	6 St.
14	01 112 36	Sechskantschraube DIN 931 M6x40	2 St.
15	01 210 33	Sechskantmutter DIN 985 M6	2 St.

Sitzblech mit KU-Clips

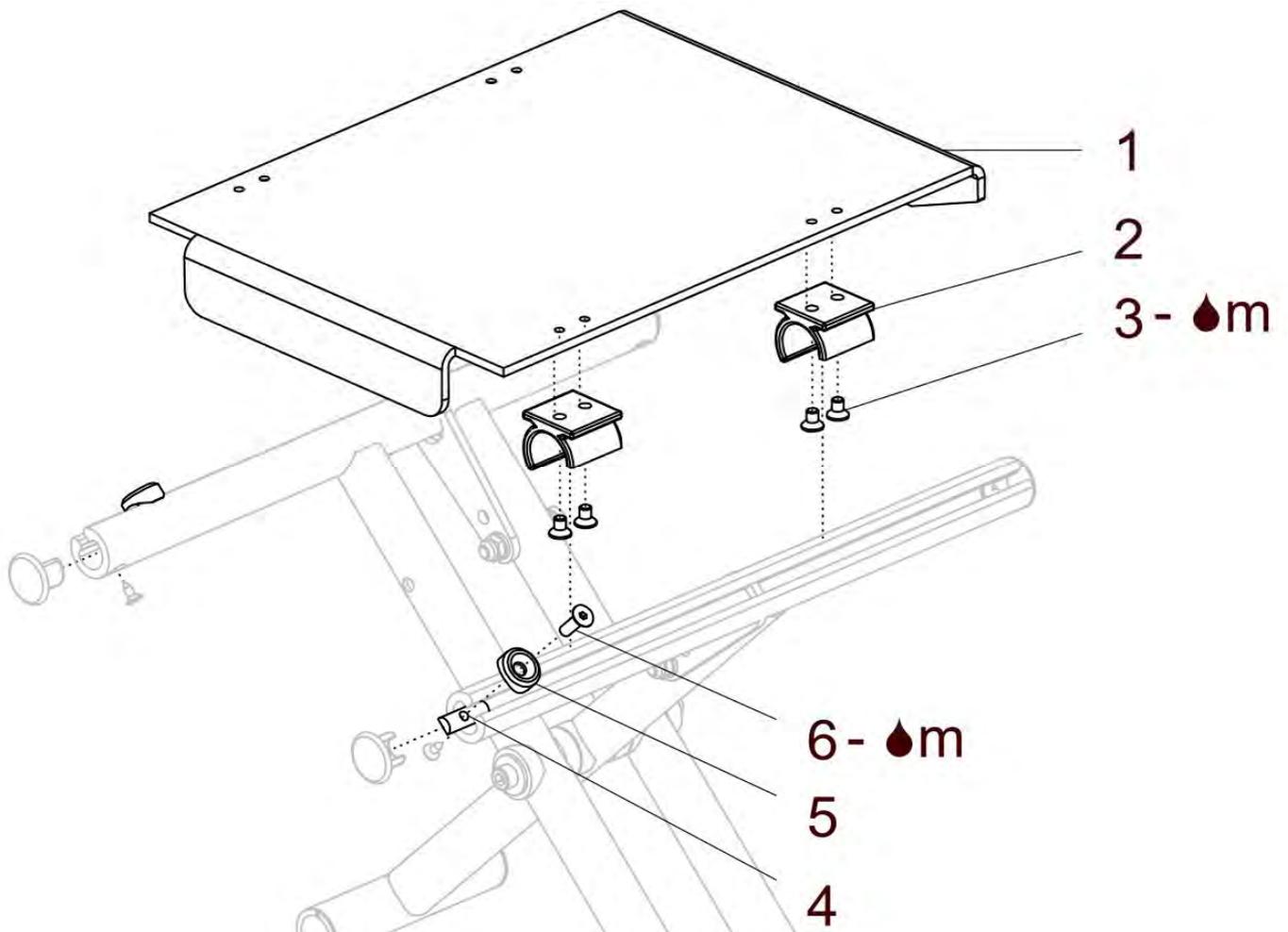

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	20 311 50	Sitzblech mit KU-Clips Junior2 / Little SB... / ST... kpl. Sitzblech mit Fixierung durch KU-Clips SB: ? (SB 24cm – 36cm) ST: ? (ST 26cm – 38cm) FM: ?	1 St.
1	20 311 60	Sitzblech für KU-Clips SB: ? (SB 24cm – 36cm) ST: ? (ST 26cm – 38cm) FM: ?	1 St.
2	20 311 59	Clip für C-Profilrohr ø23	4 St.
3	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	8 St.
		optional:	
4 – 6	20 311 80	Fixierung Sitzblech kpl. Fixierung mit Nutenstein Hinweis: Bedarf eventuell bei Junior2 AR, wenn das Sitzrohr der Kreuzstrebe länger ist wie die Sitzplatte bzw. die Sitztiefe	2 St.
4	20 311 81	Nutenstein kurz (zum Fixieren des Sitzbleches)	2 St.
5	45 111 01	Halbschale ø6,2 / ø18 ALU schwarz	2 St.
6	01 120 82F	Senkschraube M5x16 - DIN 7991 ZNS schwarz	2 St.

Sitzkissen

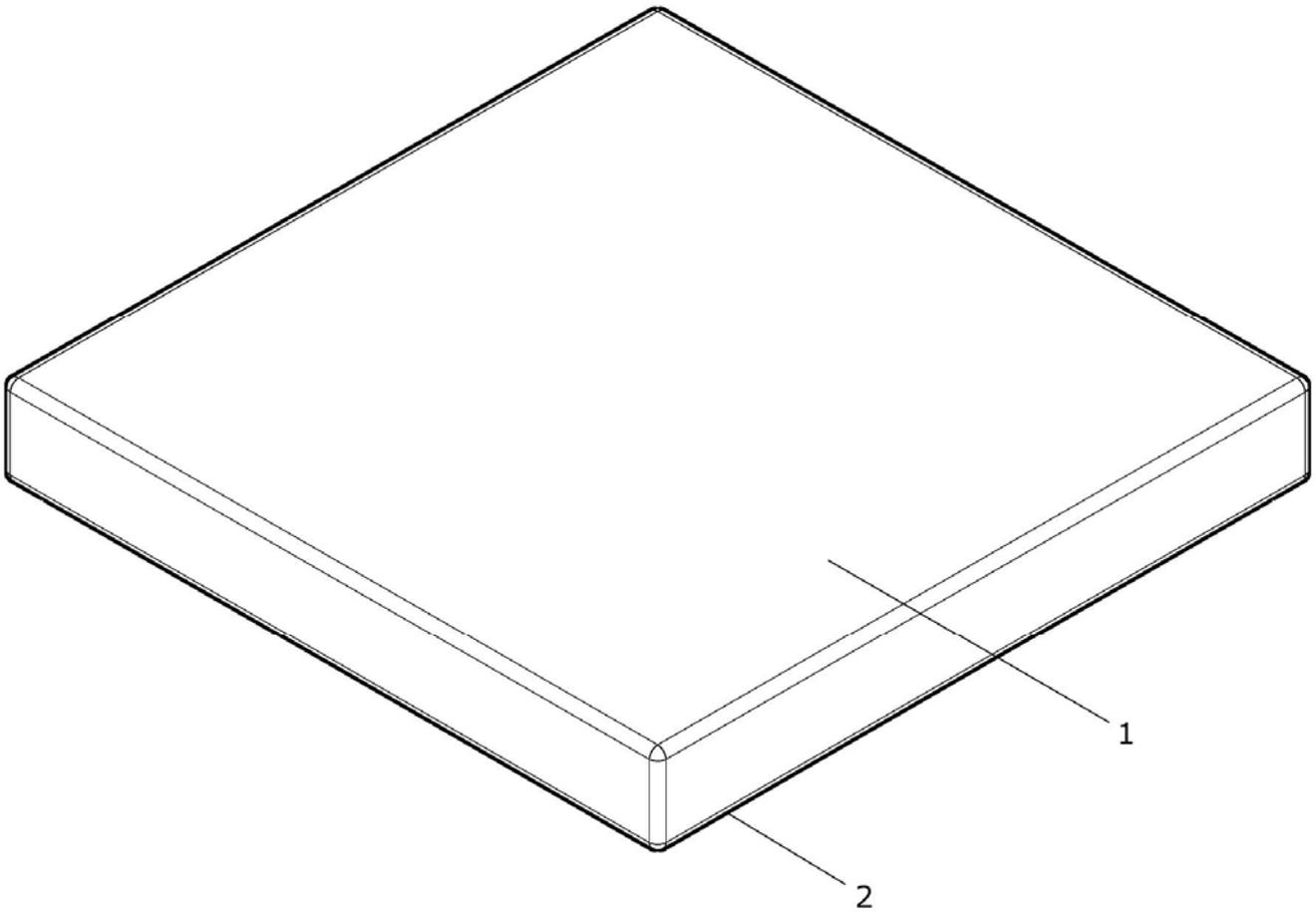


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2a	50 393 00	Sitzkissen schwarz 3cm kpl. SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 393 01	Sitzkissen-Verbundschaum 3cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2a	50 393 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2b	45 393 00	Sitzkissen 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2b	45 393 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2c	45 393 50	Sitzkissen SLIMLINE 3cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2c	45 393 95	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 3cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 393 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 3cm SB: ? ST: ?	1 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2d	50 395 00	Sitzkissen schwarz 5cm kpl. SB: ? ST: ?	1 St.
1	50 395 01	Sitzkissen-Verbundschaum 5cm (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2d	50 395 90	Sitzkissenbezug schwarz für Kissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.
1 – 2e	45 395 00	Sitzkissen 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2e	45 395 90	Sitzkissenbezug atmungsaktiv für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
1 – 2f	45 395 50	Sitzkissen SLIMLINE 5cm atmungsaktiver Stoff ... kpl. SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
2f	45 395 90	Sitzkissenbezug SLIMLINE für Kissen 5cm SB: ? ST: ? FB: Stoff ?	1 St.
o. Bild	50 395 70	Inkontinenz- Unterbezug für Sitzkissen 5cm SB: ? ST: ?	1 St.

FIDIBUS – anatomisch geformte Sitzeinheit

FIDIBUS – F hinten gerade (bei Rollstühlen mit Rückenbespannung)

FIDIBUS (bei Rollstühlen mit FIDIBUS-Rücken)

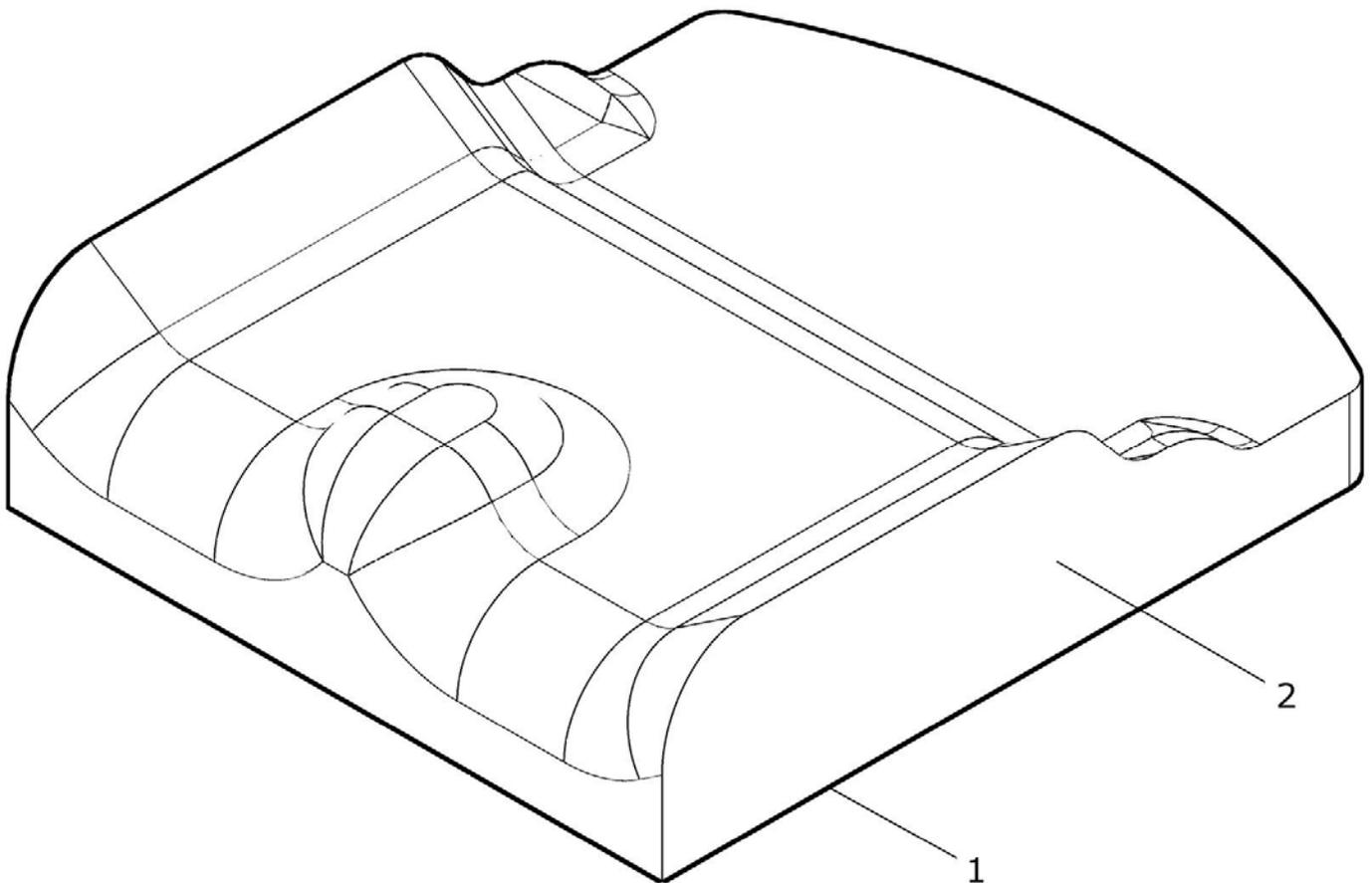

FIDIBUS-F – Sitzkissen bei Verwendung einer Rückenbespannung:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	25 355 00	Sitzkissen FIDIBUS-F kpl. anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F (hinten gerade) mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte (für Rollstühle mit Rückenbespannung) SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.
1	25 356 00	Sitzkissen FIDIBUS-F (ohne Bezug) anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F für Rollstühle mit Rückenbespannung (hinten gerade) mit eingearbeiteter Aluplatte SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 356 81	Sitzkissenbezug für anatomisches Sitzkissen FIDIBUS-F SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.

FIDIBUS - Sitzkissen bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken oder MATRIX-Rücken:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	25 350 00	FIDIBUS Sitz - anatomisch geformter Sitz SB.. ST.. kpl. Sitzformteil mit atmungsaktivem Bezug und eingearbeiteter Aluplatte (bei Verwendung eines FIDIBUS-Rücken oder MATRIX-Rücken) SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.
1	25 351 00	Sitzkissen FIDIBUS (ohne Bezug) Anatomisch geformtes Sitzkissen FIDIBUS mit eingearbeiteter Aluplatte (ohne Bezug) SB: ? ST: ?	1 St.
2	25 251 81	Bezug für anatomisch geformten Sitz FIDIBUS SB: ? ST: ? FB: ? (Bespannungsstoff AGW-Stoff)	1 St.

Seitenteil

Gruppe 4

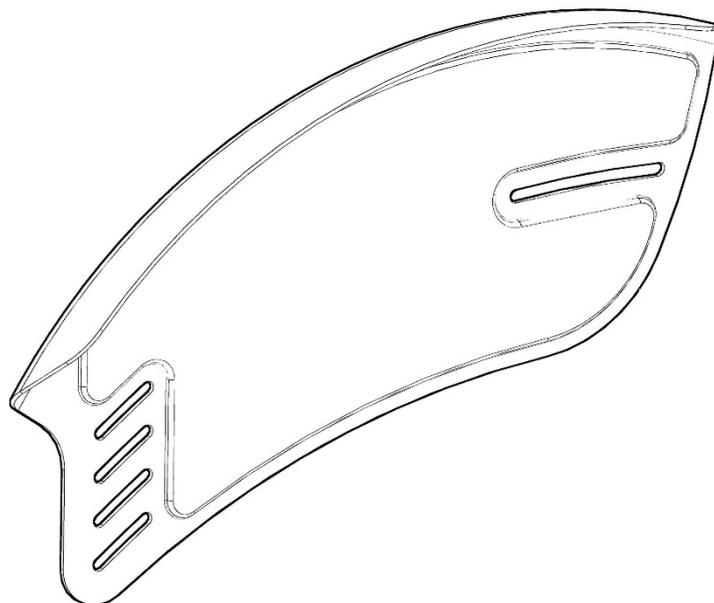


Kleiderschutz Aluminium anschraubbar

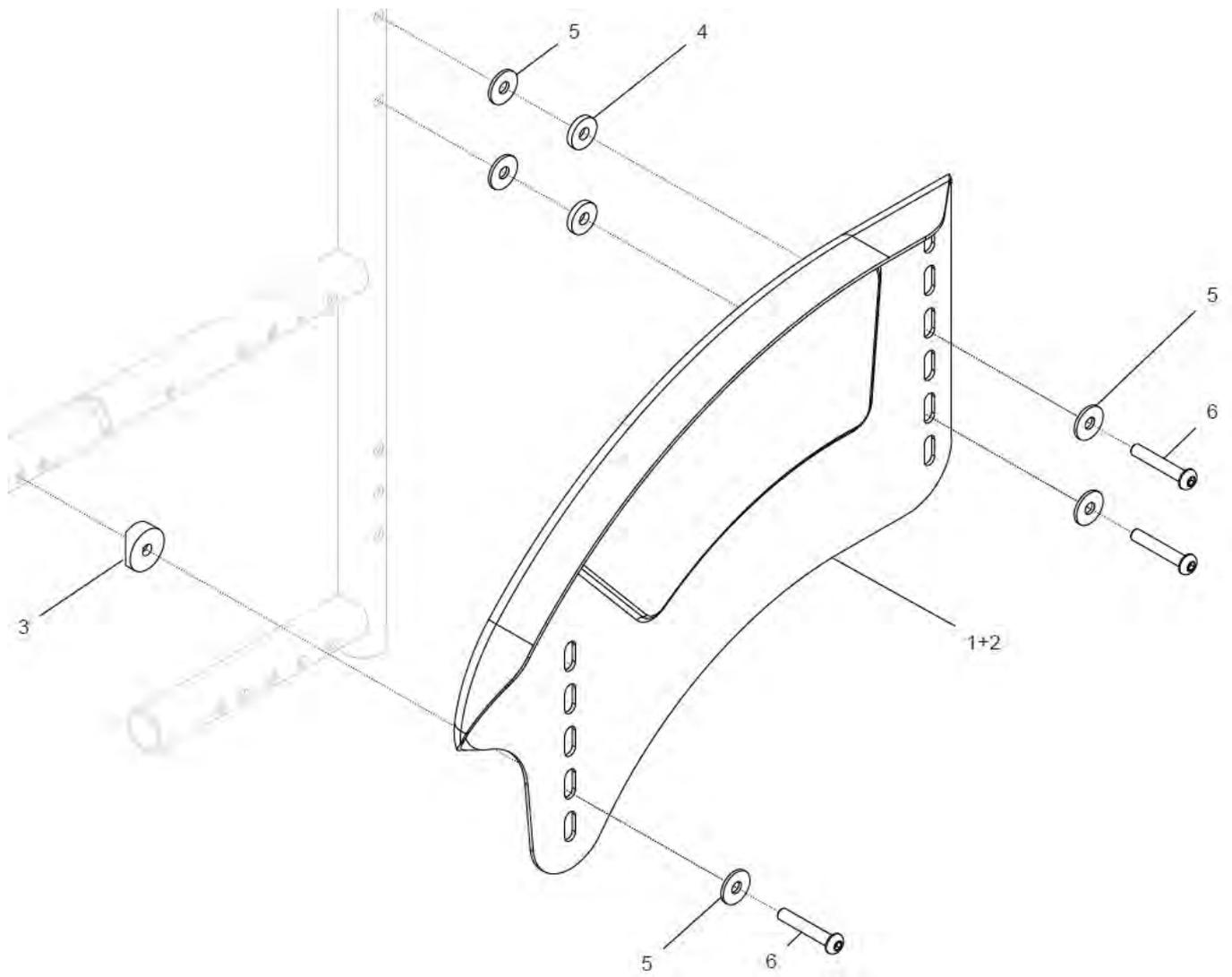


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	50 415 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium Paar kpl. FM: ?	1 Paar
1a - 6	50 416 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1b - 6	50 417 00	Kleiderschutz 24" rund Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1a	50 416 01	Kleiderschutz 24" rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	50 417 01	Kleiderschutz 24" rund Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
1 - 6	22 425 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium Paar kpl. FM: ?	1 Paar
1c - 6	22 426 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1d - 6	22 427 00	Kleiderschutz 22" rund Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1c	22 426 01	Kleiderschutz 22" rund Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1d	22 427 01	Kleiderschutz 22" rund Aluminium links FM: ?	1 St.

Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz anschraubbar

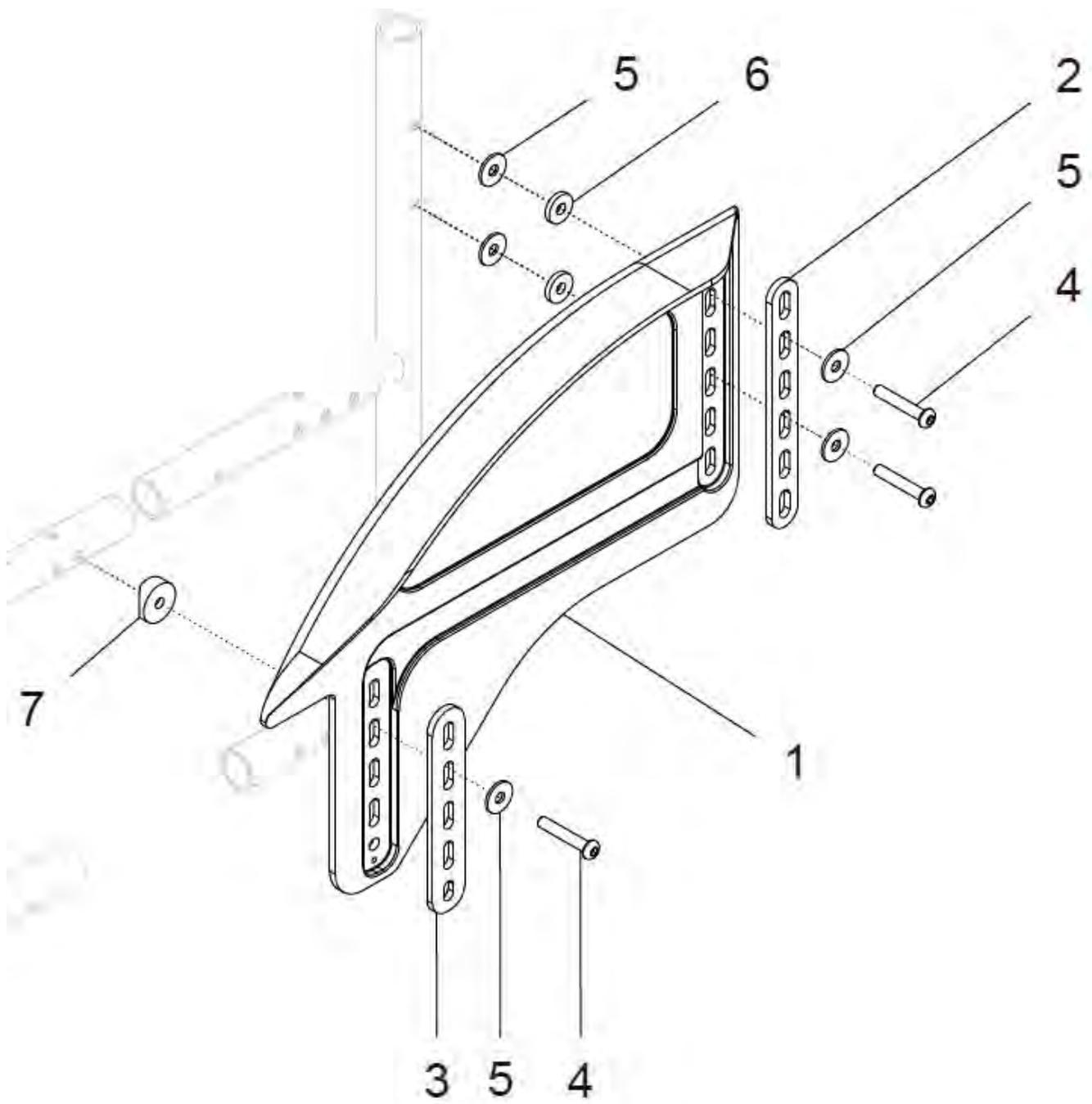

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	22 499 00	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz Paar kpl. mit Halterung / Verstärkung (für Junior 2 / Little)	1 Paar.
1a – 7	22 499 20	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz rechts kpl. mit Verstärkung	1 St.
1b – 7	22 499 30	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz links kpl. mit Verstärkung	1 St.
1a	25 449 21	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz rechts	1 St.
1b	25 449 31	Kleiderschutz Kunststoff KIDS schwarz links	1 St.
2 - 9	50 411 10	Verstärkung Kleiderschutz anschraubbar kpl.	2 Satz
2	50 411 11	Verstärkung Kleiderschutz Kunststoff lang	2 St.
3	50 411 12	Verstärkung Kleiderschutz Kunststoff kurz	2 St.
4	01 152 25	Linsenschraube M6x35 - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.

Kleiderschutz PC-CARBON anschraubbar

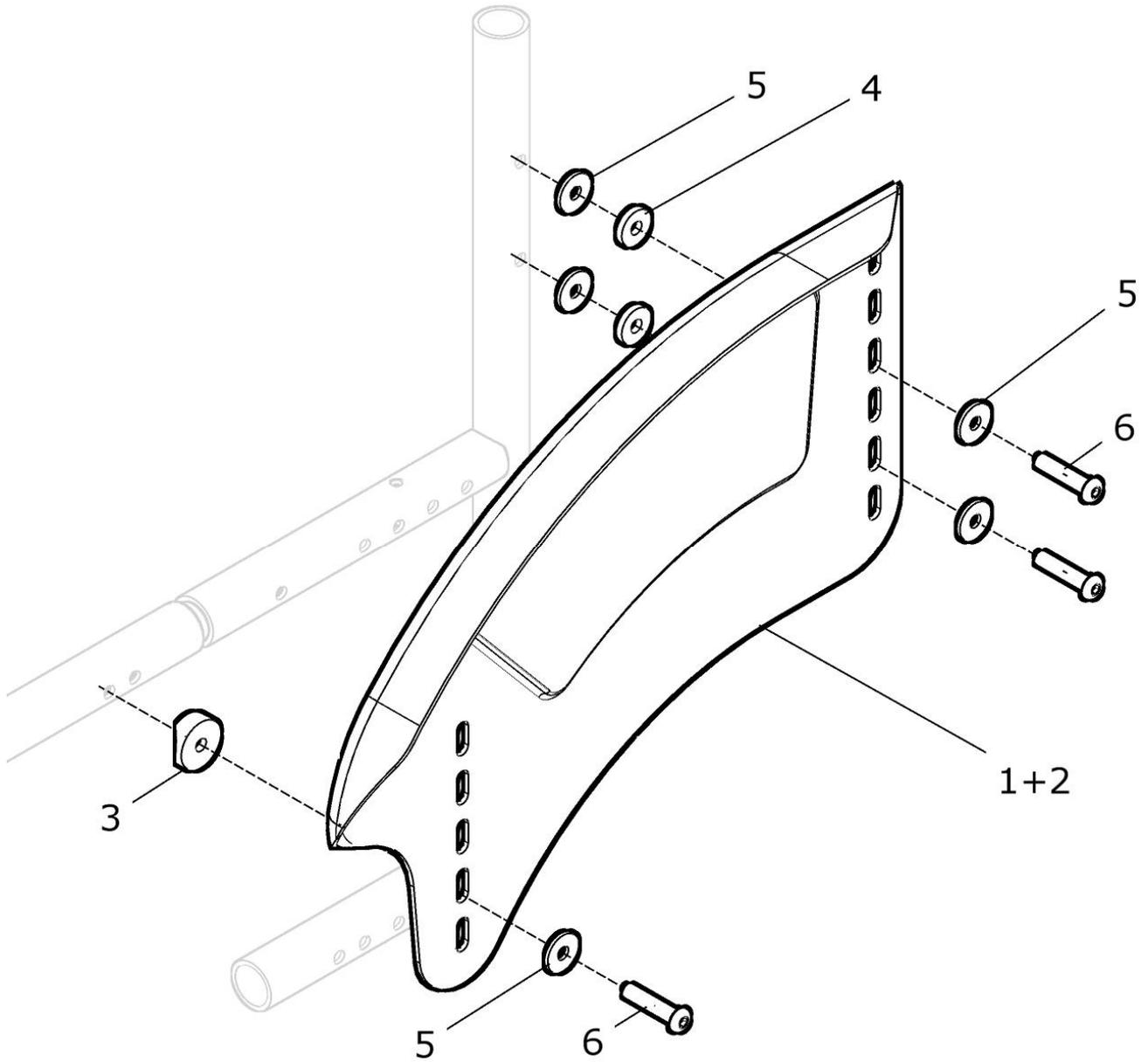

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b – 6	22 450 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1a – 6	22 452 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1b – 6	22 453 00	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1a	22 452 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1b	22 453 01	Kleiderschutz 24“ rund PC-CARBON links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 – 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


1c, 1d – 6	22 450 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1c – 6	22 452 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1d – 6	22 453 10	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 St.
1c	22 452 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON rechts	1 St.
1d	22 453 11	Kleiderschutz 22“ rund PC-CARBON links	1 St.

Kleiderschutz PC-CARBON b r e i t


1e, 1f – 6	22 450 20	Kleiderschutz 24“ rund b r e i t PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1e	22 452 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1f	22 453 21	Kleiderschutz 24“ rund breit PC-CARBON links	1 St.

1g, 1h – 6	22 450 30	Kleiderschutz 22“ rund b r e i t PC-CARBON Paar kpl. mit Halterung und Kälteschutz	1 Paar
1g	22 452 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON rechts	1 St.
1h	22 453 31	Kleiderschutz 22“ rund breit PC-CARBON links	1 St.

Kleiderschutz rund Aluminium steckbar

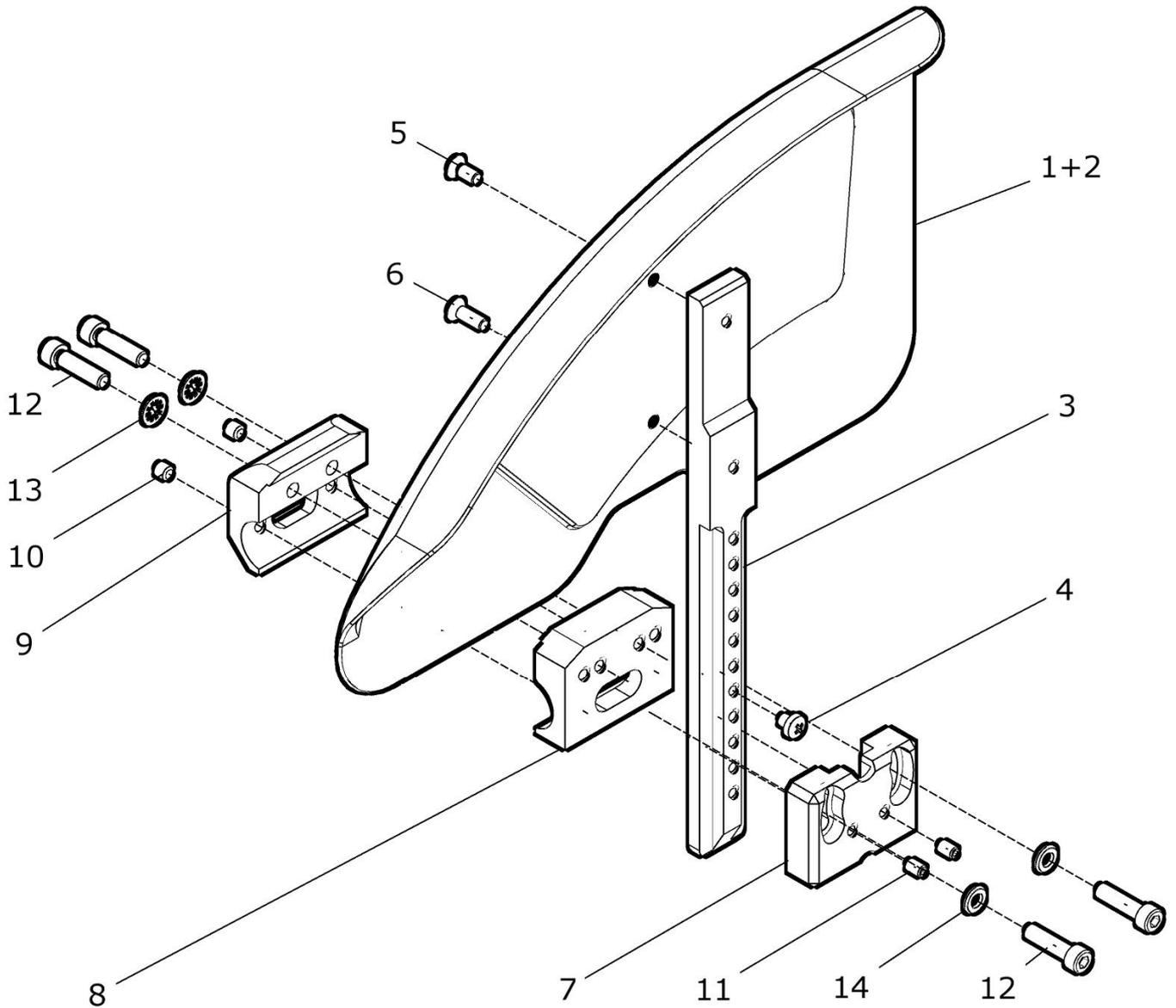


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	85 415 00	Kleiderschutz rund Aluminium steckbar Paar kpl. mit Schiene und Halterungen d=23 mm	1 Paar
1a – 14	85 416 00	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts kpl. mit Schiene und Halterung d=23 mm	1 St.
1b – 14	85 417 00	Kleiderschutz Aluminium steckbar links kpl. mit Schiene und Halterung d=23 mm	1 St.
1a – 6	85 416 10	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1b - 6	85 417 10	Kleiderschutz Aluminium steckbar links mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1a	85 416 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar rechts	1 St.
1b	85 417 01	Kleiderschutz Aluminium steckbar links	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
4	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
5	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
6	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
7 – 14	85 411 00	Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl. (links / rechts verwendbar)	2 St.
7	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
8	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
9	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
10	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
11	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
12	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
13	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
14	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.

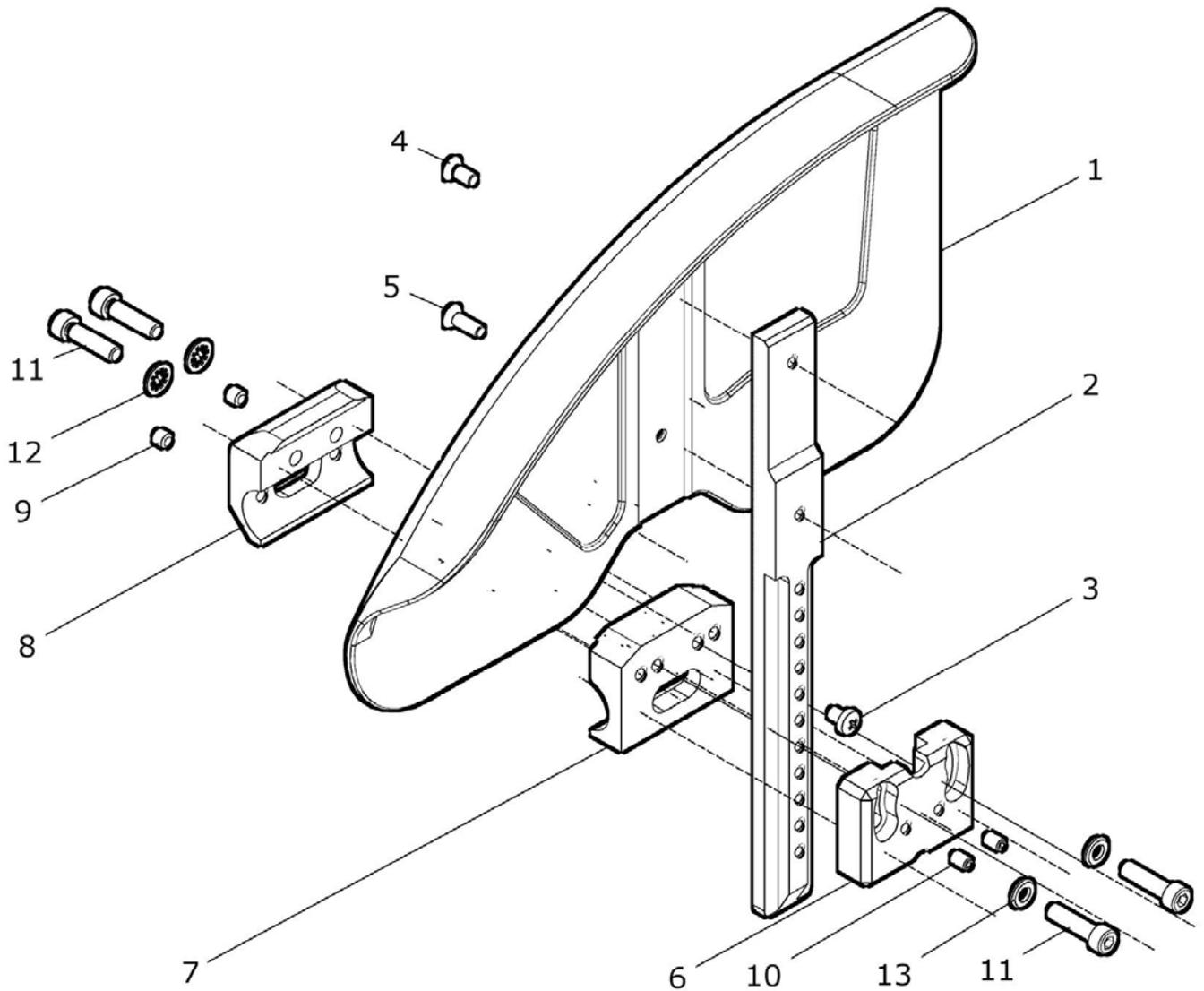Kleiderschutz Kunststoff steckbar

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 13	85 410 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar Paar kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 Paar
1a – 13	85 412 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 St.
1b – 13	85 413 00	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links kpl. mit Schiene und Halterungen d=23	1 St.
1a – 5	85 412 10	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1b – 5	85 413 10	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links mit Schiene (ohne Halterung)	1 St.
1a	85 412 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar rechts	1 St.
1b	85 413 51	Kleiderschutz Kunststoff schwarz steckbar links	1 St.
2	85 411 14	Schiene für Kleiderschutz steckbar	2 St.
3	01 151 81	Linsenkopfschraube M5x8 schwarz - DIN 7985	2 St.
4	01 120 02	Senkkopfschraube M5x12 - DIN 7991	2 St.
5	01 120 03	Senkkopfschraube M5x16 - DIN 7991	2 St.
6 – 13	85 411 00	Halterung Ø23 mm für Kleiderschutz steckbar kpl. (links / rechts verwendbar)	2 St.
6	85 411 13	Halterung Ø23mm außen	2 St.
7	85 411 12	Halterung Ø 23mm mittig	2 St.
8	85 411 11	Halterung Ø 23mm innen	2 St.
9	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.
10	01 131 91	Gewindestift Poly M5x 8 - DIN 551	4 St.
11	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	4 St.
12	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 6	4 St.
13	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.


Kleiderschutz rund Aluminium mit Armpolster

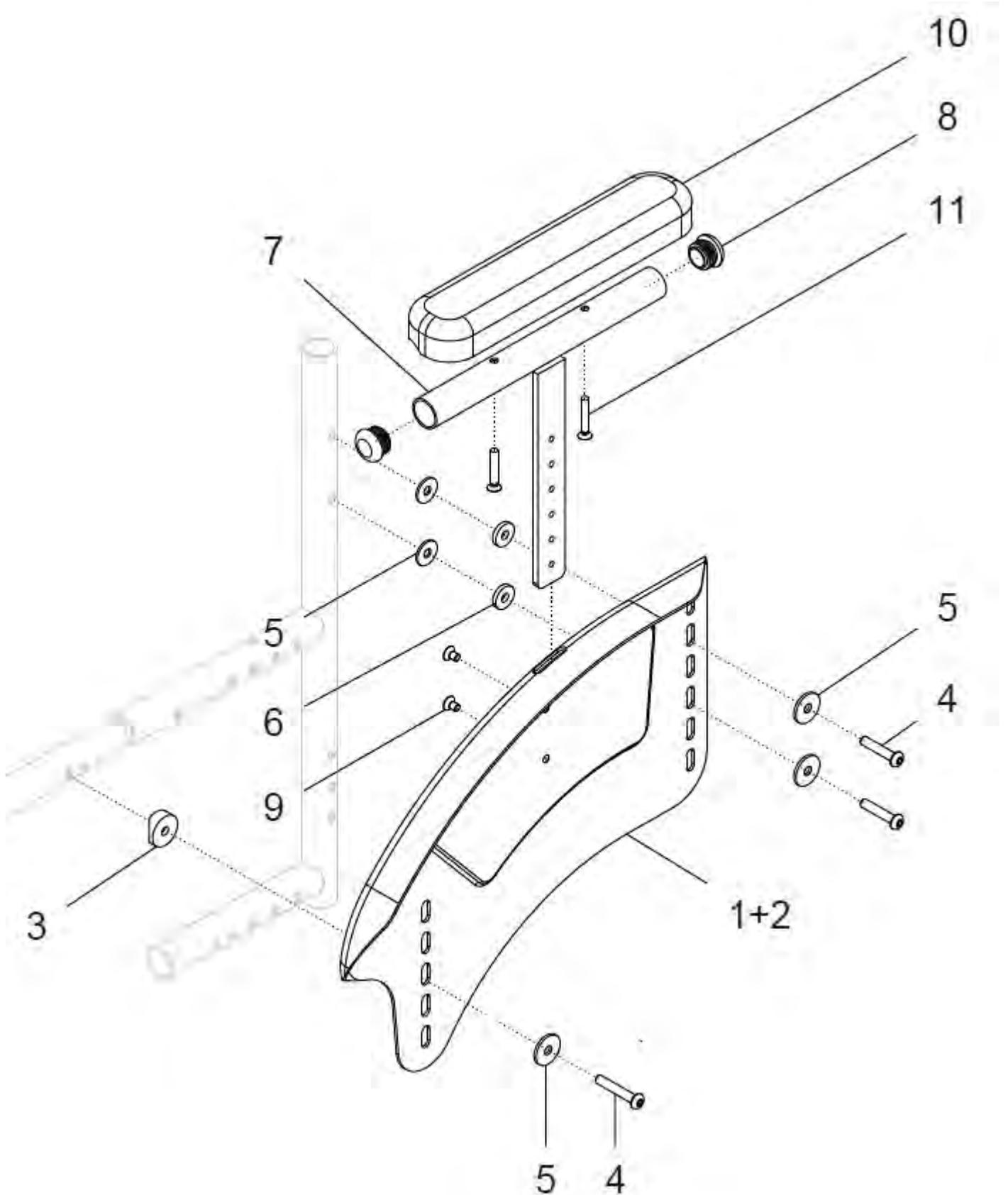

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 425 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1 - 11	22 425 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1a – 11	22 426 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b – 11	22 427 70	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1a – 11	22 426 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b - 11	22 427 75	Kleiderschutz 24“ Alu. mit Armpolster lang links kpl. FM.: ?	1 St.
1a	50 416 51	Kleiderschutz 24“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	50 417 51	Kleiderschutz 24“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 425 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1 - 11	22 425 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1c – 11	22 426 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1d – 11	22 427 50	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1c – 11	22 426 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1d - 11	22 427 60	Kleiderschutz 22“ Alu. mit Armpolster lang links kpl. FM.: ?	1 St.
1c	22 426 51	Kleiderschutz 22“ rechts Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
1d	22 427 51	Kleiderschutz 22“ links Aluminium für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a – 10a, 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7b – 10b, 11	50 416 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
7c – 10b, 11	50 417 80	Armpolsterhalter mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
7a	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
7b	50 416 81	Armpolsterhalter lang rechts	1 St.
7c	50 417 81	Armpolsterhalter lang links	1 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
10b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.

Seitenteil Aluminium anschraubbar

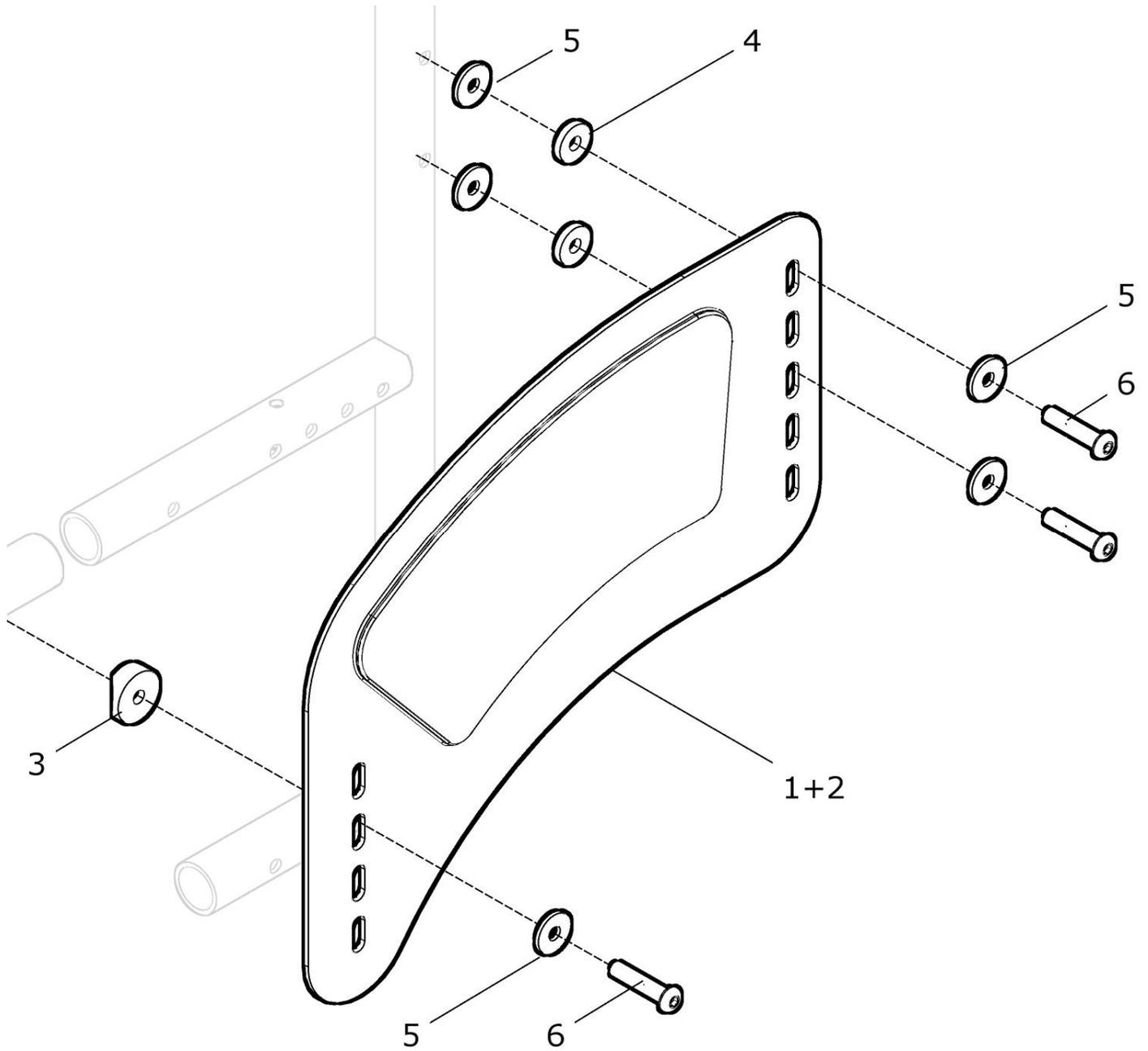

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	22 420 00	Seitenteil Aluminium anschraubbar Paar kpl. Seitenteilblech anschraubbar FM: ?	1 Paar
1a – 6	22 422 00	Seitenteil Aluminium rechts kpl. FM: ?	1 St.
1b – 6	22 423 00	Seitenteil Aluminium links kpl. FM: ?	1 St.
1a	22 422 01	Seitenteilblech Aluminium rechts FM: ?	1 St.
1b	22 423 01	Seitenteilblech Aluminium links FM: ?	1 St.
2	50 415 01	Kälteschutz für Kleiderschutz rund	2 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF – ISO 7380	6 St.


Seitenteil Aluminium mit Armpolster kurz

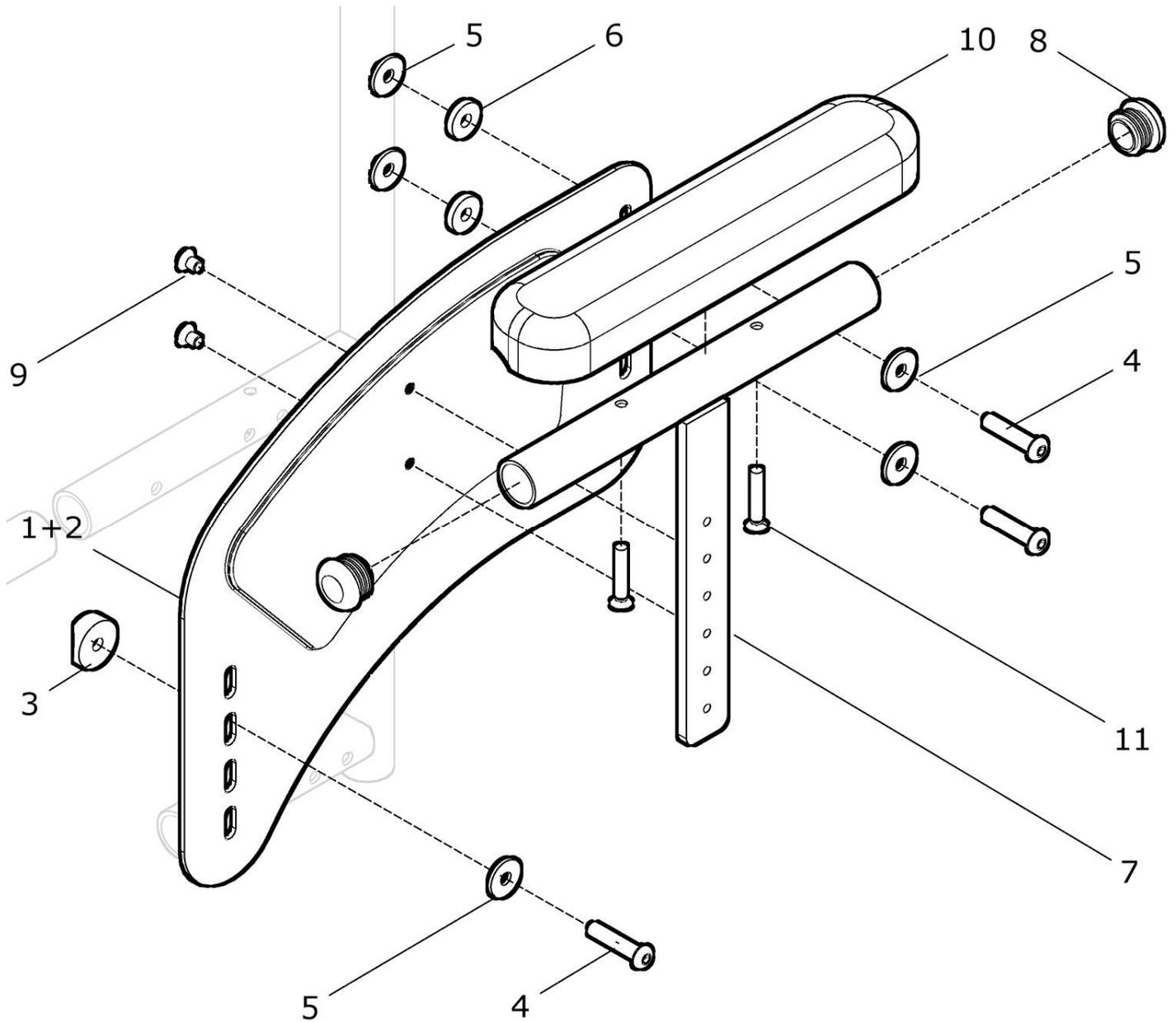

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	22 435 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz Paar kpl. FM.: ?	1 Paar
1a – 11	22 436 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz rechts kpl. FM.: ?	1 St.
1b – 11	22 437 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz links kpl. FM.: ?	1 St.
1a	22 436 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster FM: ?	1 St.
1b	22 437 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster FM: ?	1 St.
2a	50 416 58	Kälteschutz rechts für Kleiderschutz rechts mit Armpolster	1 St.
2b	50 417 58	Kälteschutz links für Kleiderschutz links mit Armpolster	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7 – 11	50 415 50	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz kpl. links und rechts verwendbar	2 St.
7	50 415 51	Armpolsterhalter kurz	2 St.
8	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
9	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991	4 St.
10	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
11	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.


Seitenteil Aluminium mit Armpolster höhenverstellbar

(Armpolsterhalter mit Schiene)

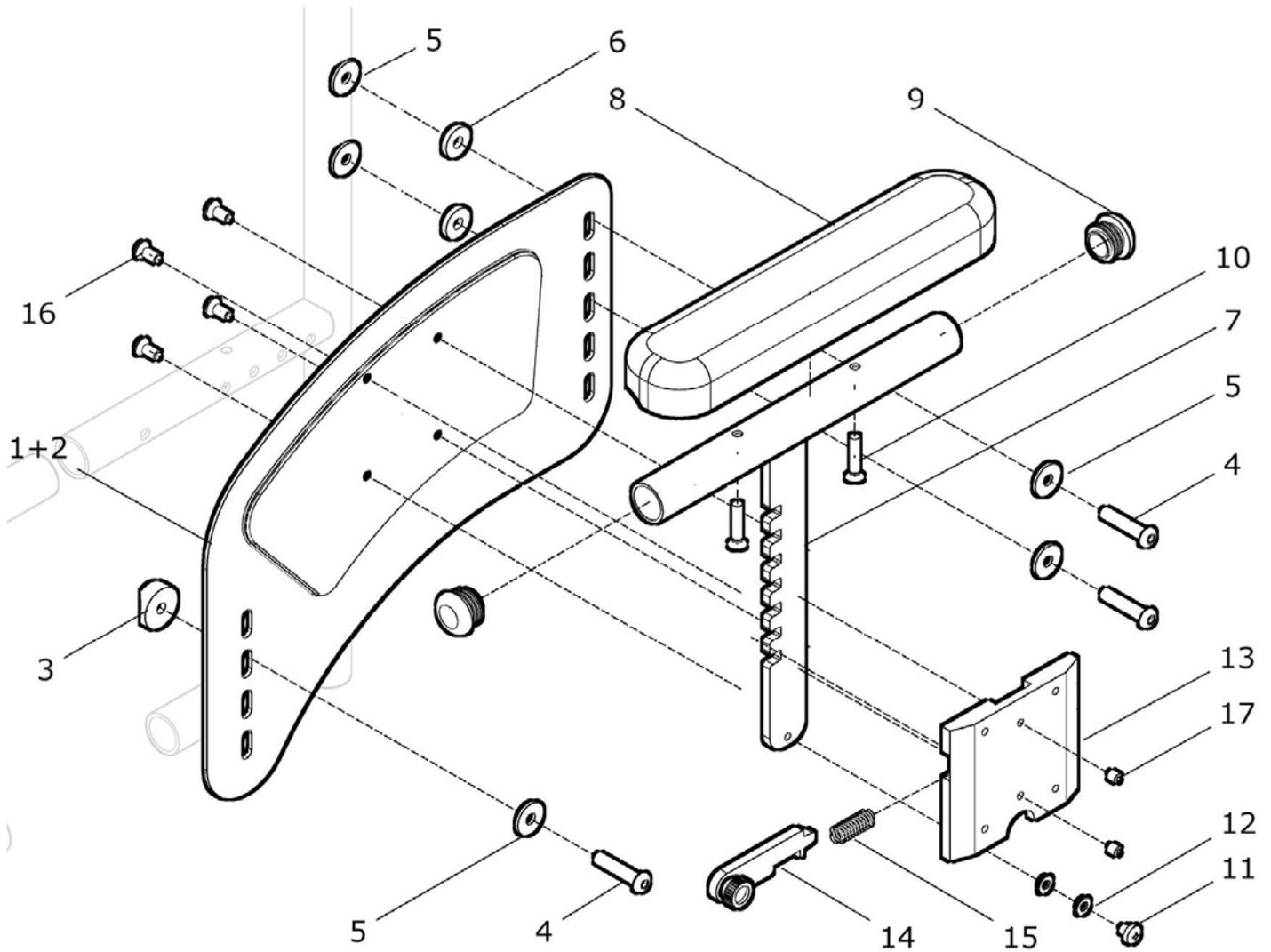


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	22 430 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 FM.: ?	1 Paar
1 – 17	22 430 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 FM.: ?	1 Paar
1a – 17	22 432 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 17	22 433 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter kurz 25x5 links FM.: ?	1 St.
1a – 17	22 432 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 17	22 433 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse flach (50mm) mit Schieber und Armpolsterhalter lang 25x5 links FM.: ?	1 St.
1a	22 432 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Schiene (50mm) FM: ?	1 St.
1b	22 433 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Schiene (50mm) FM: ?	1 St.
2a	22 432 02	Kälteschutz rechts für Seitenteil rechts mit Führungsgehäuse (50mm)	1 St.
2b	22 433 02	Kälteschutz links für Seitenteil links mit Führungsgehäuse (50mm)	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a, 8a – 12	90 442 30	Armpolsterhalter kurz rechts kpl. mit Armpolster kurz	1 St.
7b, 8a – 12	90 443 30	Armpolsterhalter kurz links kpl. mit Armpolster kurz	1 St.

7c, 8b – 12	90 442 60	Armpolsterhalter lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7d, 8b – 12	90 443 60	Armpolsterhalter lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7a	90 442 31	Armpolsterhalter kurz rechts (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7b	90 443 31	Armpolsterhalter kurz links (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7c	90 442 61	Armpolsterhalter lang rechts (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
7d	90 443 61	Armpolsterhalter lang links (mit Verstellchiene 25x5)	1 St.
8a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
8b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
9	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
10	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
11	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
12	01 320 01	Scheibe 5,3 - DIN 125	4 St.
13 14a - 17	90 441 20	Führungsgehäuse flach mit Schieber rechts kpl.	2 St.
13, 14b - 17	90 441 30	Führungsgehäuse flach mit Schieber links kpl.	2 St.
13	90 441 01	Führungsgehäuse flach (50mm)	2 St.
14a	90 442 02	Schieber mit Mutter M5 rechts	1 St.
14b	90 443 02	Schieber mit Mutter M5 links	1 St.
15	02 110 05	Druckfeder Ø6,9x22mm für Schieber	2 St.
16	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
17	01 131 90	Gewindestift M5x6 (Poly) - DIN 551	4 St.

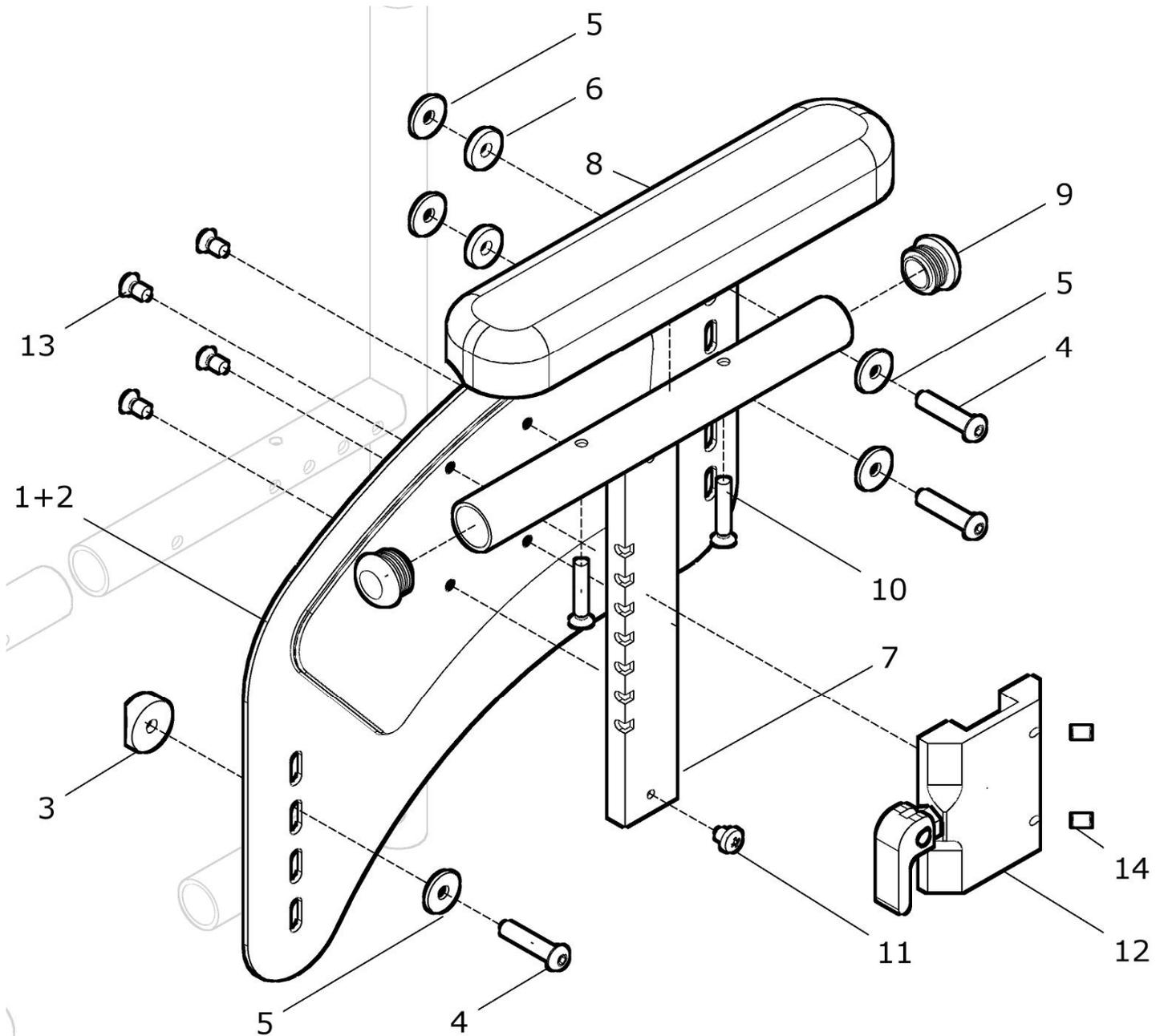
Seitenteil Aluminium mit Armpolster höhenverstellbar**(Armpolsterhalter mit Rohrprofil)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	22 440 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 FM.: ?	1 Paar
1 – 14	22 440 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar Paar kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 FM.: ?	1 Paar
1a – 14	22 442 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 14	22 443 00	Seitenteil Alu. mit Armpolster kurz höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter kurz 30x10 links FM.: ?	1 St.
1a – 14	22 442 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar rechts kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 rechts FM.: ?	1 St.
1b – 14	22 443 50	Seitenteil Alu. mit Armpolster lang höhenverstellbar links kpl. mit Führungsgehäuse (45mm) mit Hebel und Armpolsterhalter lang 30x10 links FM.: ?	1 St.
1a	22 442 01	Seitenteilblech rechts Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Rohrprofil (45mm) FM: ?	1 St.
1b	22 443 01	Seitenteilblech links Alu. für Armpolster höhenverstellbar für Führungsgehäuse Rohrprofil (45mm) FM: ?	1 St.
2a	22 442 02	Kälteschutz rechts für Seitenteil rechts mit Führungsgehäuse (45mm)	1 St.
2b	22 443 02	Kälteschutz links für Seitenteil links mit Führungsgehäuse (45mm)	1 St.
3 - 6	50 411 00	Verbindungsteile für Kleiderschutz	2 Satz
3	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
4	01 155 24	Linsenschraube M6x32 TZD TF - ISO 7380	6 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	10 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7a, 8a – 11	50 432 30	Armpolsterhalter kurz rechts kpl. mit Armpolster kurz	1 St.
7b, 8a – 11	50 433 30	Armpolsterhalter kurz links kpl. mit Armpolster kurz	1 St.

7c, 8b – 11	50 432 50	Armpolsterhalter lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7d, 8b – 11	50 433 50	Armpolsterhalter lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
7a	50 432 31	Armpolsterhalter kurz rechts (mit Rohr 30x10)	1 St.
7b	50 433 31	Armpolsterhalter kurz links (mit Rohr 30x10)	1 St.
7c	50 432 51	Armpolsterhalter lang rechts (mit Rohr 30x10)	1 St.
7d	50 433 51	Armpolsterhalter lang links (mit Rohr 30x10)	1 St.
8a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
8b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
9	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
10	01 121 02	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz M5x30 - DIN 966	4 St.
11	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
12	50 431 00	Führungsgehäuse mit Hebel kpl.	2 St.
13	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
14	01 131 91	Gewindestift M5x8 (Poly) - DIN 551	4 St.

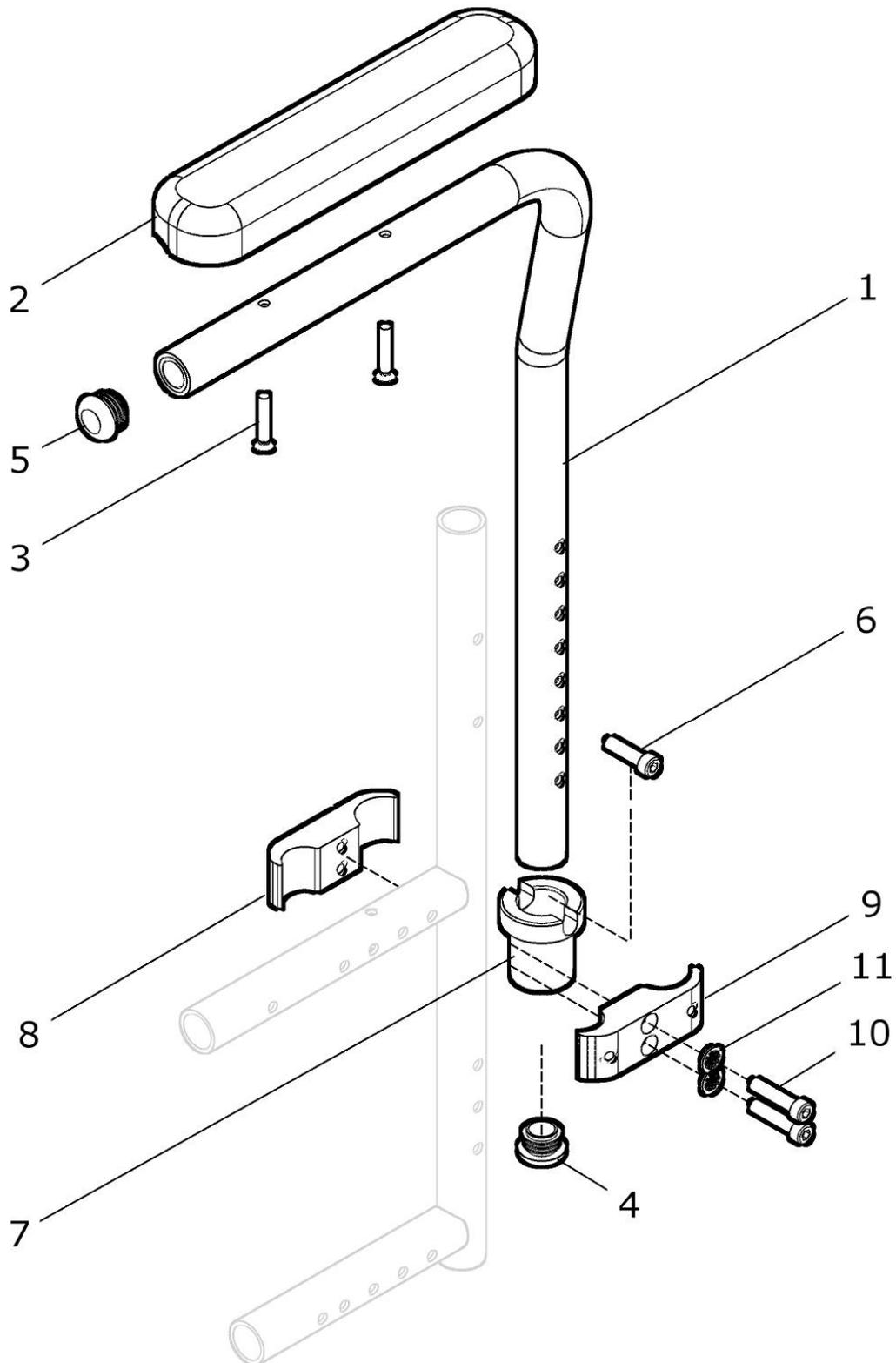Armlehne wegschwenkbar


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 423 70	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 Paar
1 - 11	40 423 50	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang Paar kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 Paar
1a – 11	40 423 80	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz rechts kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1b – 11	40 423 85	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar kurz links kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1c – 11	40 423 60	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang rechts kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1d – 11	40 423 65	Armlehne wegschwenkbar, höhenverstellbar lang links kpl. mit Aufnahmebuchse und Armlehnenhalter	1 St.
1a – 6	40 423 81	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz rechts kpl.	1 St.
1b – 6	40 423 86	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster kurz links kpl.	1 St.
1c – 6	40 423 61	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang rechts kpl.	1 St.
1d – 6	40 423 66	Armlehnenhalterrohr mit Armpolster lang links kpl.	1 St.
1a	40 423 82	Armlehnenhalterrohr kurz rechts	1 St.
1b	40 423 83	Armlehnenhalterrohr kurz links	1 St.
1c	40 423 62	Armlehnenhalterrohr lang rechts	1 St.
1d	40 423 63	Armlehnenhalterrohr lang links	1 St.
2a	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.
2b	04 100 02	Armpolster lang	2 St.
3	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
4a	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	2 St.
5a	04 210 01	Verschlussstopfen Ø19 (bei Armpolster kurz)	2 St.
5b	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23 (bei Armpolster lang)	2 St.
6	01 160 23	Zylinderkopfschraube M6x25 - DIN 912	2 St.
7 – 11	40 423 59	Aufnahmebuchse mit Armlehnenhalter kpl.	2 St
7	40 423 51	Aufnahmebuchse	2 St.
8 – 11	40 423 55	Armlehnenhalter kpl.	2 St
8	40 423 52	Armlehnenhalter M6	2 St.
9	40 423 53	Armlehnenhalter Ø6,5/Ø11	2 St.
10	01 160 24	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.

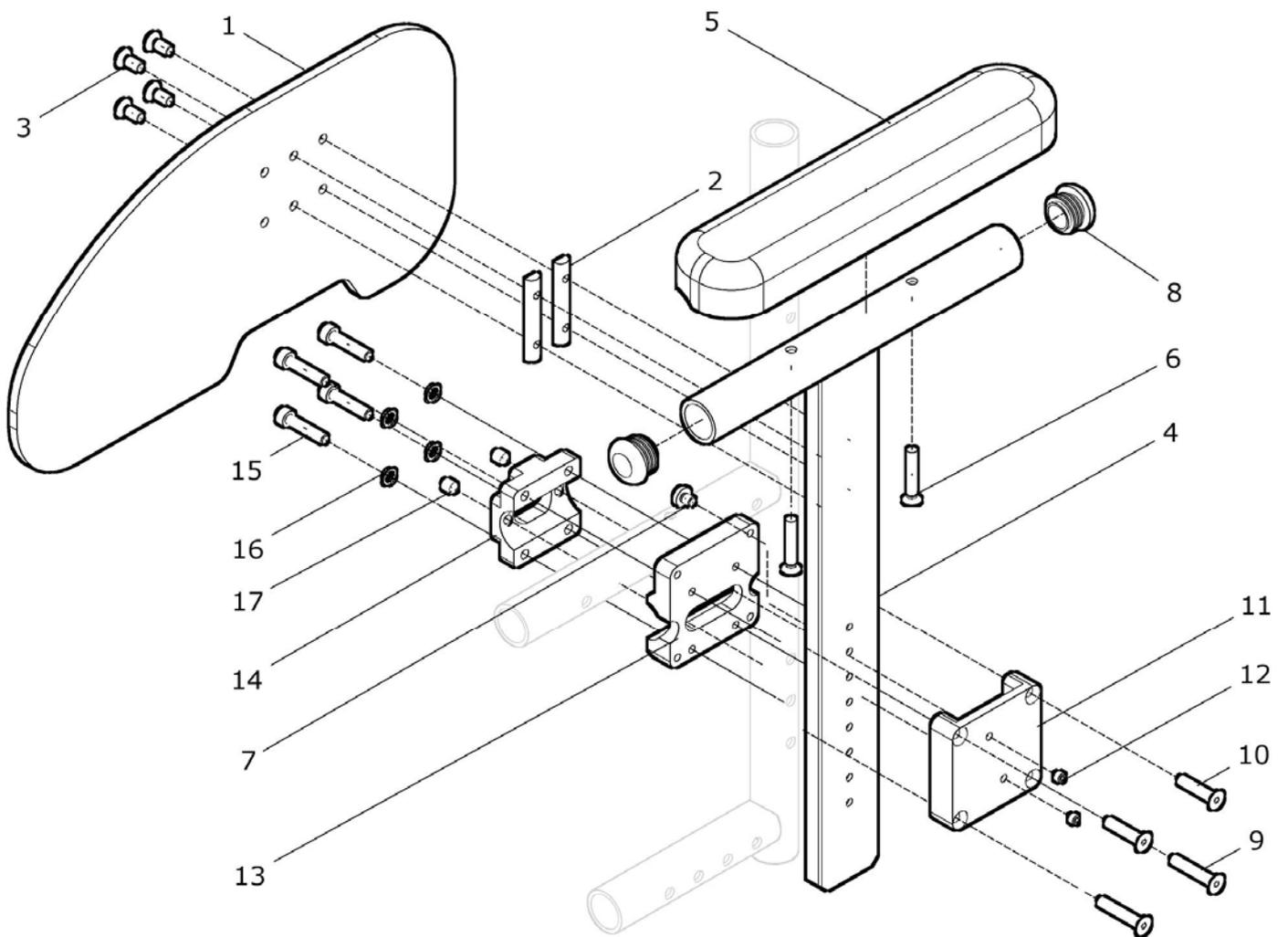Seitenteil Kunststoff kurz mit Armpolster steckbar

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	22 480 00	Seitenteil Kunststoff kurz steckbar mit Armposter kurz kpl. Armpolsterhalter kurz mit Klemmhalterung	1 Paar
1 – 15	22 480 50	Seitenteil Kunststoff kurz steckbar mit Armposter lang kpl. Armpolsterhalter lang mit Klemmhalterung	1 Paar
1a – 4a, 5a – 17	22 482 00	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz rechts kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1b – 4a, 5a – 17	22 483 00	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz links kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1a – 4b, 5b – 17	22 482 50	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang rechts kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1b – 4c, 5b – 17	22 483 50	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang links kpl. mit Klemmschelle und Aufnahmeplatte	1 St.
1a – 4a, 5a – 8	22 482 10	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz rechts (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1b – 4a, 5a – 8	22 483 10	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster kurz links (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1a – 4b, 5b – 8	22 482 60	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang rechts (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1b – 4c, 5b – 8	22 483 60	Seitenteil KU kurz steckbar mit Armpolster lang links (ohne Befestigung für Rahmen)	1 St.
1a	22 482 11	Seitenteilplatte Kunststoff kurz rechts	1 St.
1b	22 483 11	Seitenteilplatte Kunststoff kurz links	1 St.
2	91 411 01	Nutenstein für Seitenteilplatte	4 St.
3	01 121 09	Linsensenkschraube M5x10 - DIN 966	8 St.
4a, 5a – 8	91 411 10	Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links kpl. mit Armpolster kurz	2 St.
4b, 5b – 8	91 416 25	Armpolsterhalter steckbar lang rechts kpl. mit Armpolster lang	1 St.
4c, 5b – 8	91 417 25	Armpolsterhalter steckbar lang links kpl. mit Armpolster lang	1 St.
4a	91 411 11	Armpolsterhalter steckbar kurz rechts / links	2 St.
4b	91 416 21	Armpolsterhalter steckbar lang rechts	1 St.
4c	91 417 21	Armpolsterhalter steckbar lang links	1 St.
5a	04 100 01	Armpolster 235 kurz	2 St.
5b	04 100 02	Armpolster 368 lang	2 St.

6	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
7	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
8	04 210 02	Verschluss – Stopfen d.23	4 St.
9 - 17	50 481 00	Klemmhalterung für Seitenteil steckbar kpl. Halierungssatz 3-teilig	2 St.
9	01 120 06	Senkschraube M5x30 - DIN 7991	4 St.
10	01 120 05	Senkschraube M5x25 - DIN 7991	4 St.
11	91 411 12	Klemmschelle Profil Seitenteil steckbar (Kunststoff schwarz)	2 St.
12	01 131 90	Gewindestift M5x6 Poly - DIN 551	4 St.
13	50 481 01	Aufnahmeplatte geklemmt Seitenteil steckbar	2 St.
14	50 481 02	Klemmschelle innen Seitenteil steckbar	2 St.
15	01 160 10	Zylinderkopfschraube M5x25 - DIN 912	8 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungscheibe NM 6	8 St.
17	01 131 12	Gewindestift M6x6 - DIN 914	4 St.

Therapietisch

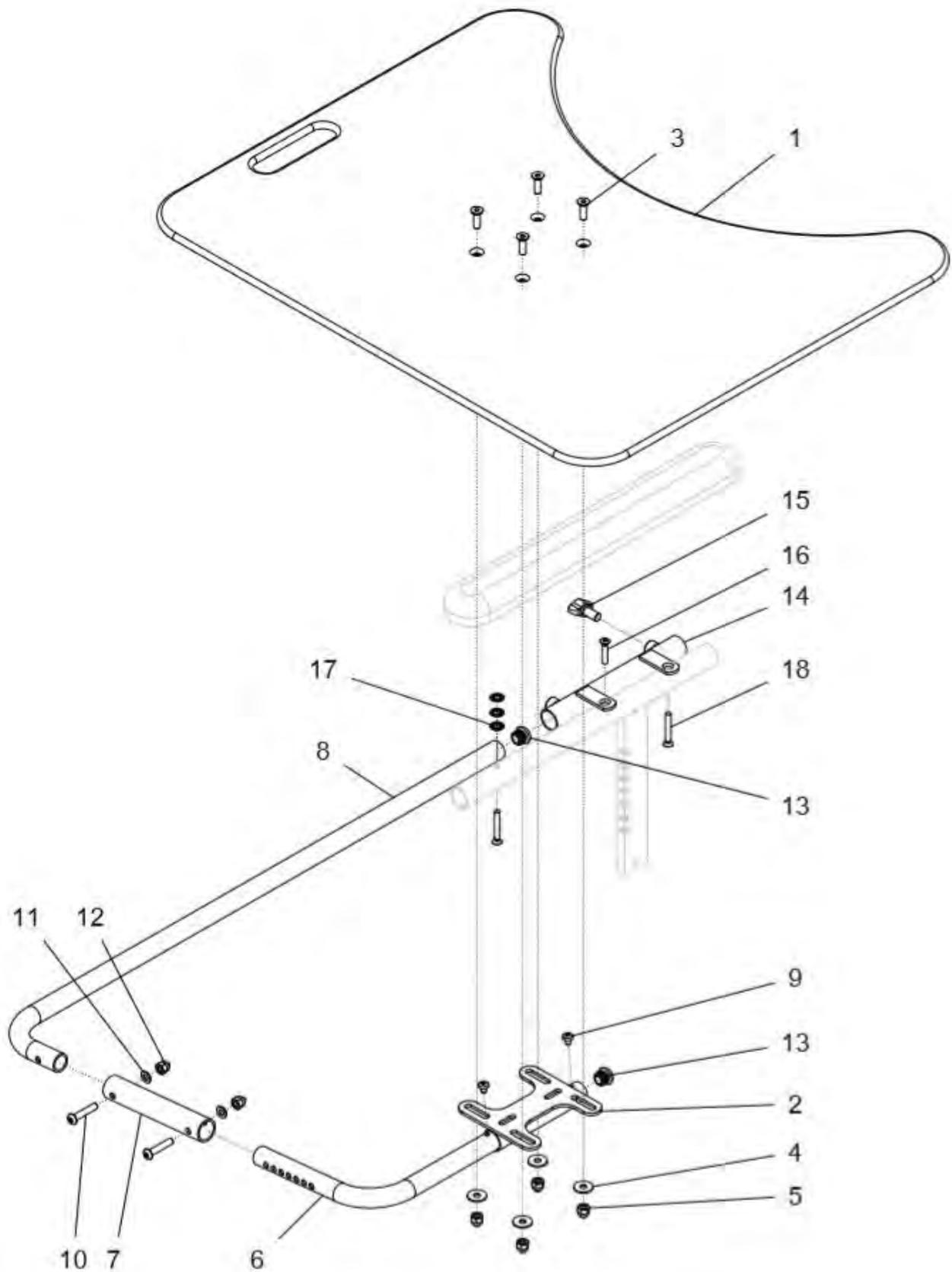


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 18	50 460 00	Therapietisch mit Halterung kpl Therapietischplatte mit Bügelrohr, Auflagerplatte und Führungsrohr SB: ?	1 St.
1a	50 461 12	Therapietischplatte (T500xB600) SB 42 - 50	1 St.
1b	50 461 13	Therapietischplatte (T450xB500) SB 34 – 40	1 St.
1c	50 461 16	Therapietischplatte (T400xB400) SB 24 – 32	1 St.
2 - 5	50 461 10	Auflagerplatte Therapietisch kpl.	1 St.
2	50 461 01	Auflagerplatte Therapietisch	1 St.
3	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
4	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
5	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	6 St.
6a, 7a, 8a – 13	50 461 03	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 38 - 50	1 St.
6b, 7b, 8b - 13	22 461 20	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 28 - 36	1 St.
6c, 7c, 8b - 13	22 461 10	Bügelrohr 3-teilig kpl. SB 24 - 30	1 St.
6a	50 461 33	Verstellrohr lang SB 38 – 50	1 St.
6b	50 461 43	Verstellrohr mittel SB 28 – 36	1 St.
6c	22 461 23	Verstellrohr kurz SB 24 – 30	1 St.
7a	50 461 32	Verbindungsrohr SB 38 – 50	1 St.
7b	22 461 22	Verbindungsrohr SB 28 – 36 mittel	1 St.
7c	22 461 12	Verbindungsrohr SB 24 – 30 kurz	1 St.
8a	50 461 31	Schieberohr SB 38 – 50	1 St.
8b	22 461 21	Schieberohr SB 24 – 36 kurz	1 St.
9	01 151 00	Linsenkopfschraube M5x6 - DIN 7985	2 St.
10	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4	2 St.
12	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986	2 St.
13	04 210 01	Verschluss-Stopfen d=19 mm	2 St.
13 - 18	50 461 20	Führungsrohr kpl.	1 St.
14a	50 461 02	Führungsrohr (Mutter seitlich) standard	1 St.
14b	50 461 09	Führungsrohr (Mutter nach unten) Sonderbau	1 St.
15	01 191 08	Flügelschraube mini wing M8x12	1 St.

LITTLE

16	01 121 01	Linsensenkschraube M5x25 - DIN 966	1 St.
17	01 320 01	Scheibe 5,3 - DIN 125	3 St.
18	01 121 03	Linsensenkschraube M5x35 - DIN 966	2 St.

Kleiderschutz ERGO AL

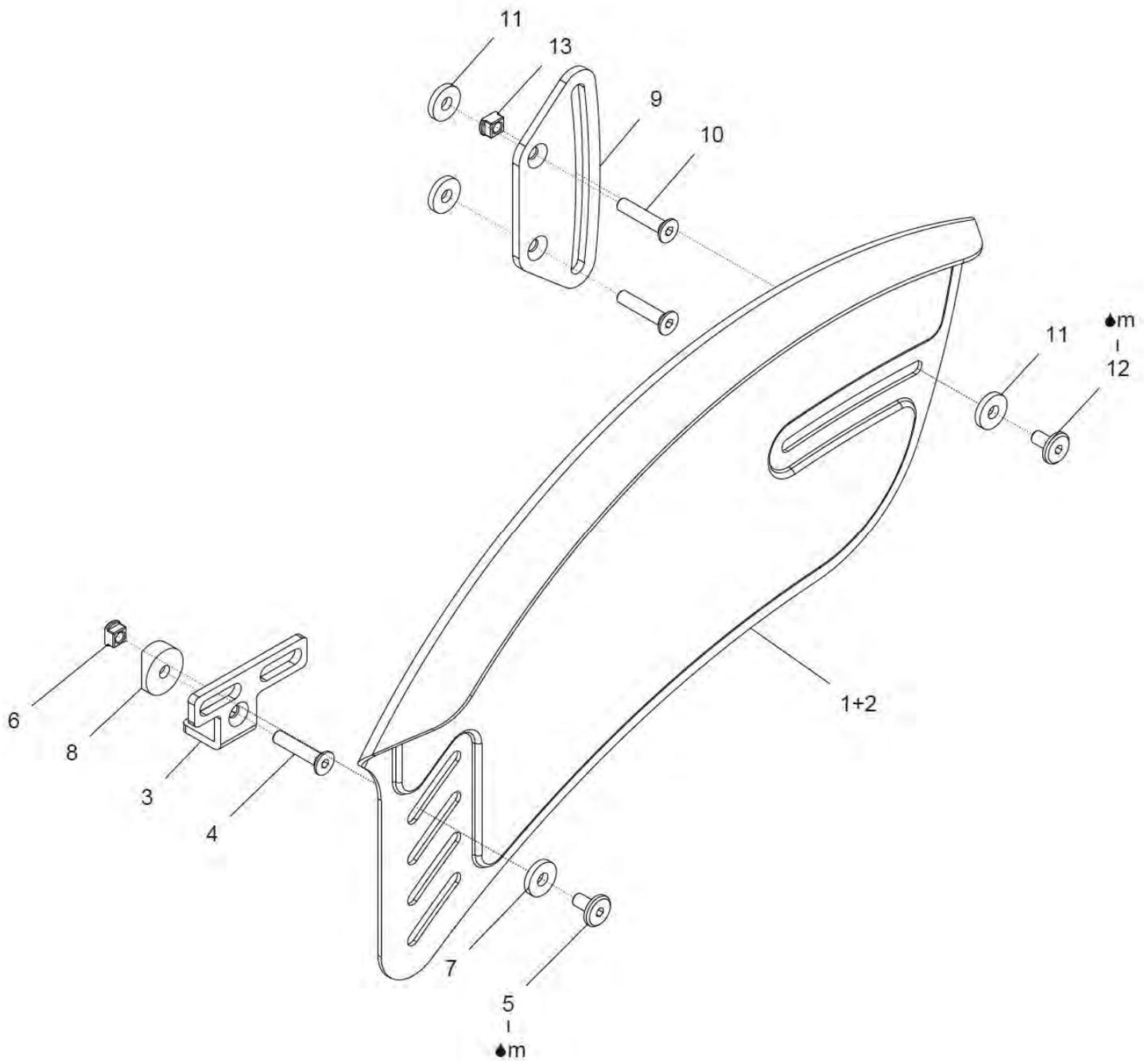

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a, 1b, 2 – 13	40 430 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1a – 13	40 432 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1b – 13	40 432 03	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1c, 1d, 2 – 13	40 430 04	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1c – 13	40 434 02	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1d – 13	40 434 03	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:

Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

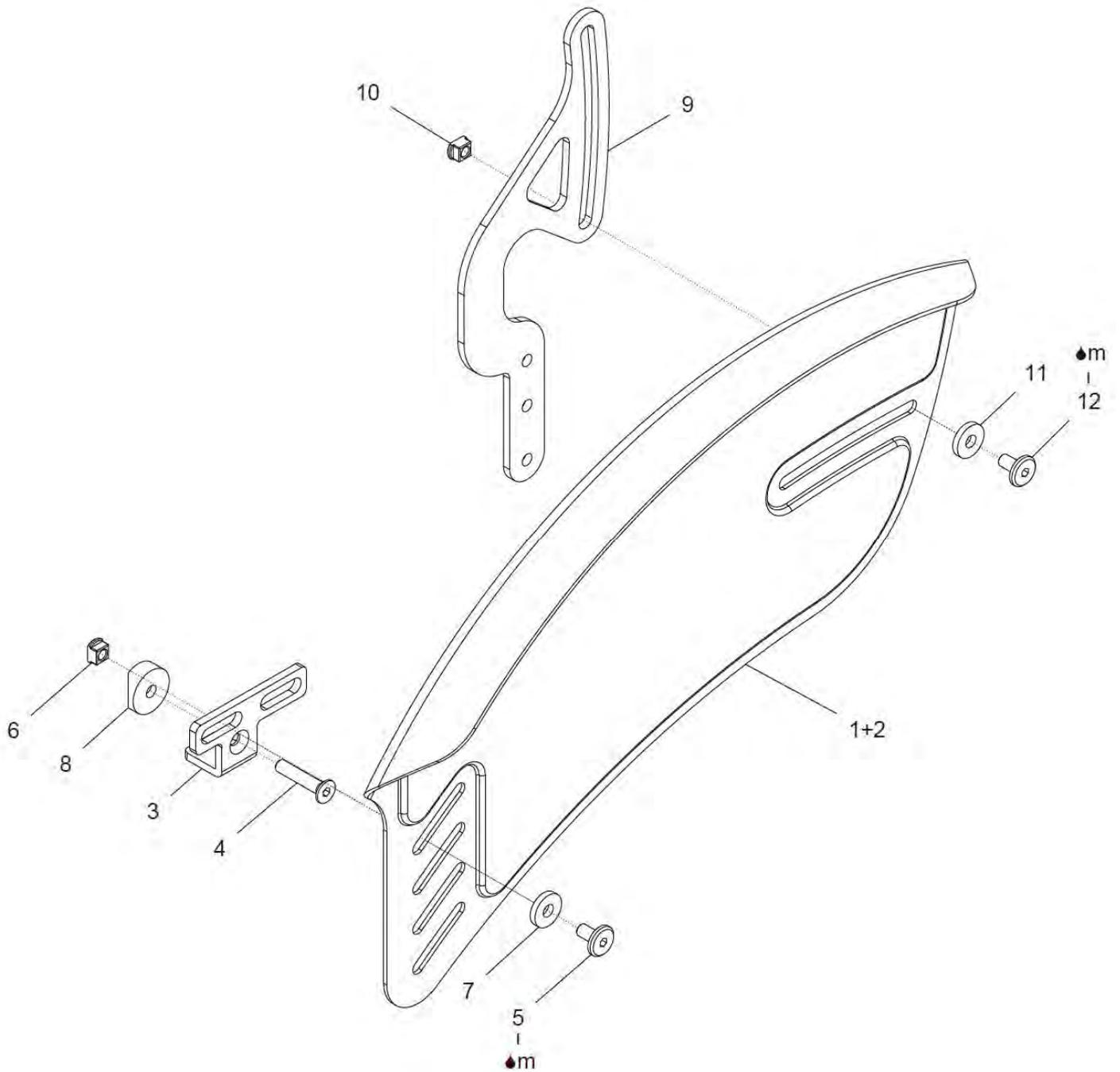Kleiderschutz ERGO AL bei 30°-Rücken / Zahnsegmente

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 430 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1a – 11	40 432 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1b – 11	40 432 43	Kleiderschutz Ergo Al 22“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 7	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 7	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
8 – 11	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
8	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
9	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
11	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 430 44	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1c – 11	40 434 42	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1d – 11	40 434 43	Kleiderschutz Ergo Al 24“ 30°Rü./Zahnseg- links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 7	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 7	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
8 – 11	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
8	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
9	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
11	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL bei UNITOMIC-Rücken

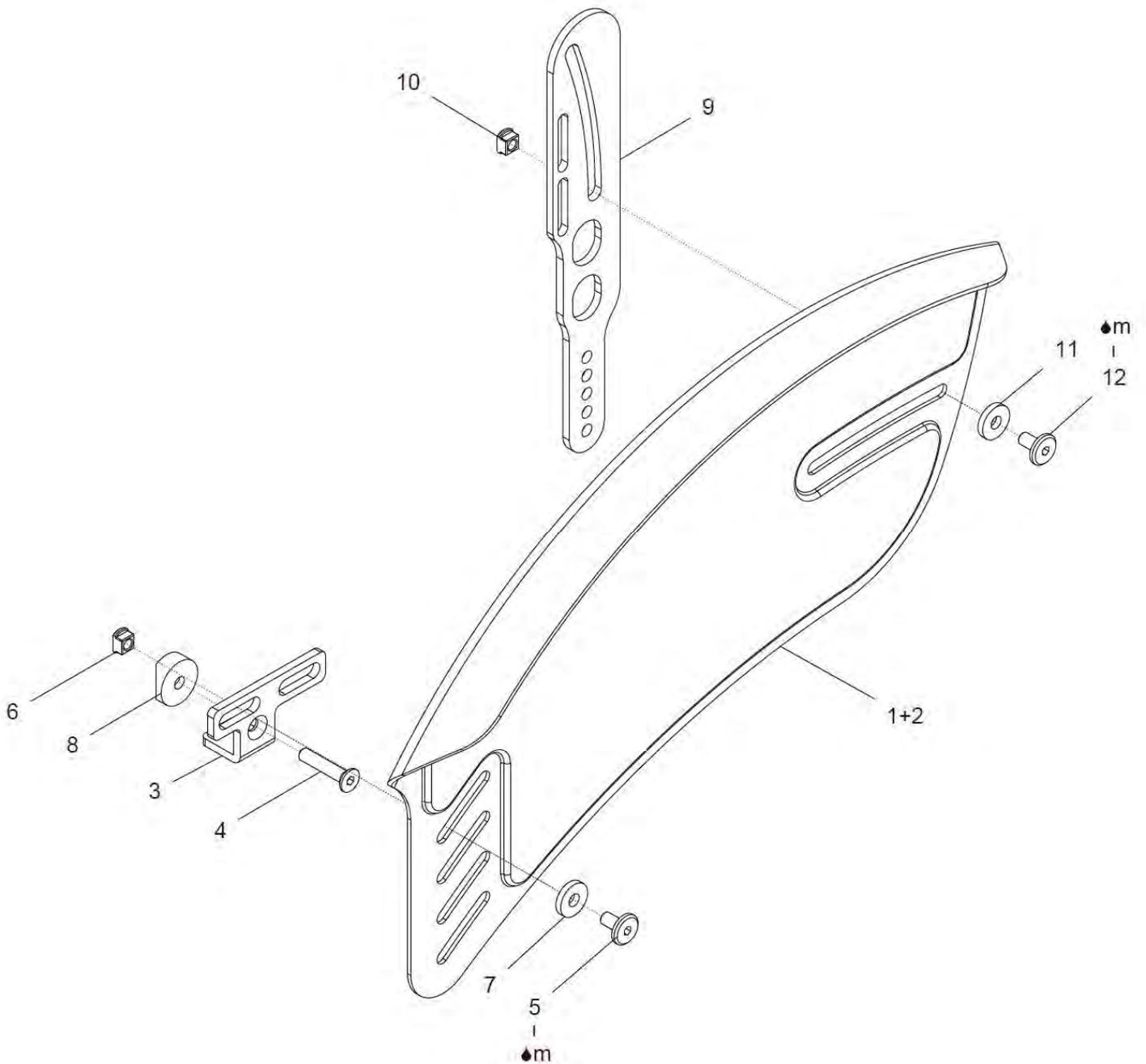

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 430 45	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1a – 11	40 432 44	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1b – 11	40 432 45	Kleiderschutz Ergo Al 22“ UNITOMIC-Rücken links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 432 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 432 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1a	40 432 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts FM: ?	1 St.
1b	40 432 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 7	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 7	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
8 – 11	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
8	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
9	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
11	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	40 430 46	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1c – 11	40 434 44	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1d – 11	40 434 45	Kleiderschutz Ergo Al 24“ UNITOMIC-Rücken links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 434 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 434 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung) FM: ?	1 St.
1c	40 434 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts FM: ?	1 St.
1d	40 434 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links FM: ?	1 St.
2a	40 434 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts	1 St.
2b	40 434 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links	1 St.
3a – 7	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 7	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
6	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
7	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
8 – 11	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
8	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
9	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
10	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
11	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

Alternativen zu Halter Pos. 3:


Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO CARBON

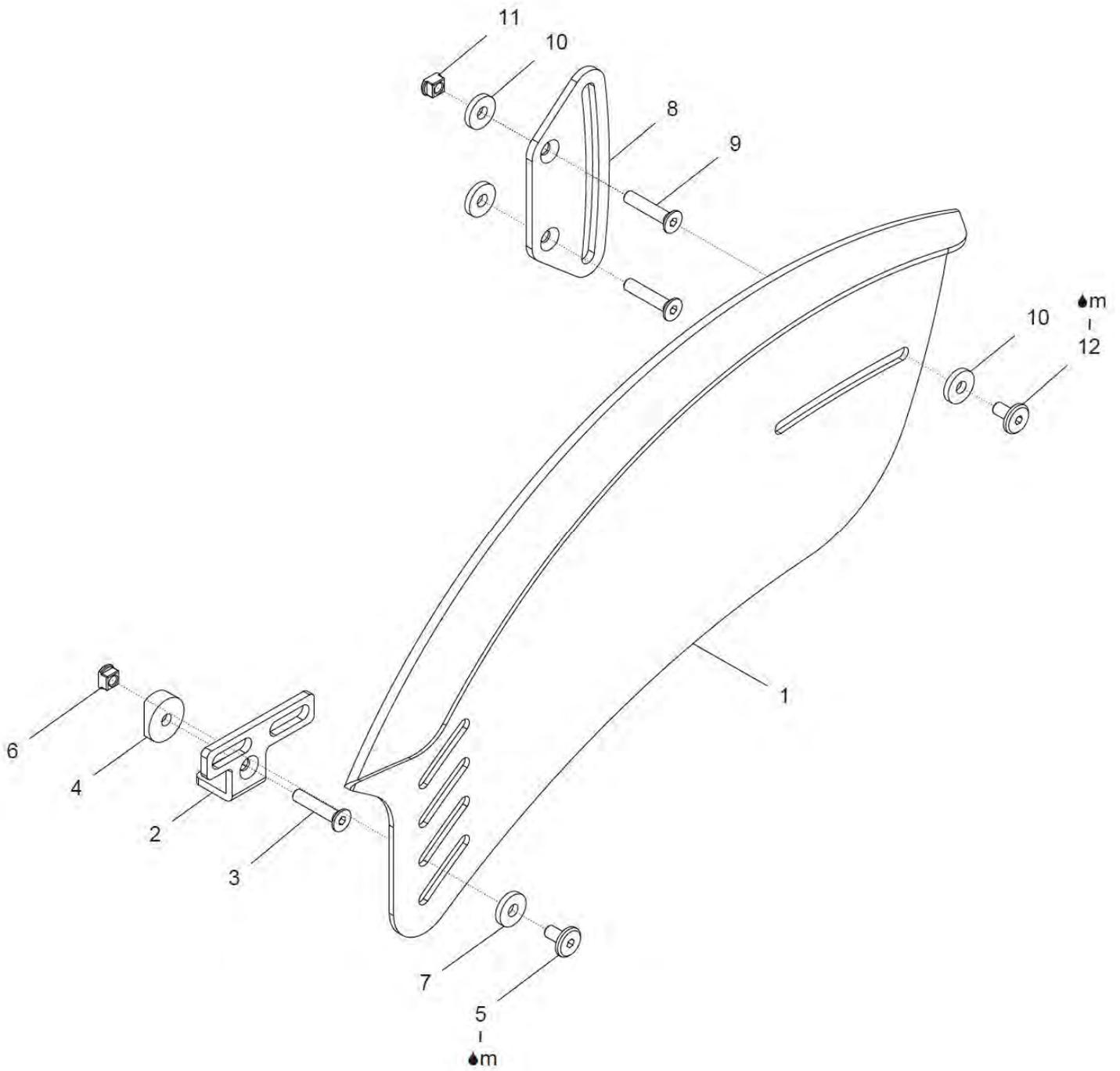

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	40 430 72	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 Paar
1a – 12	40 432 60	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1b – 12	40 432 70	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1a	40 432 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ rechts	1 St.
1b	40 432 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 22“ links	1 St.
2a – 6	40 431 20	Halterung ERGO vorne rechts kpl.	1 Satz
2b – 6	40 431 30	Halterung ERGO vorne links kpl.	1 Satz
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
5	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7 – 11	40 431 10	Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.	2 Satz
7	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
8	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
10	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	40 430 74	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ Paar kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 Paar
1c – 12	40 434 60	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1d – 12	40 434 70	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links kpl. mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade)	1 St.
1c	40 434 61	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ rechts	1 St.
1d	40 434 71	Kleiderschutz Ergo CARBON 24“ links	1 St.
2a – 6	40 431 20	Halterung ERGO vorne rechts kpl.	1 Satz
2b – 6	40 431 30	Halterung ERGO vorne links kpl.	1 Satz
2a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
2b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
3	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
4	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
5	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
6	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	4 St.
7 – 11	40 431 10	Halterung ERGO hinten rechts / links kpl.	2 Satz
7	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
8	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
9	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
10	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
11	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:

Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

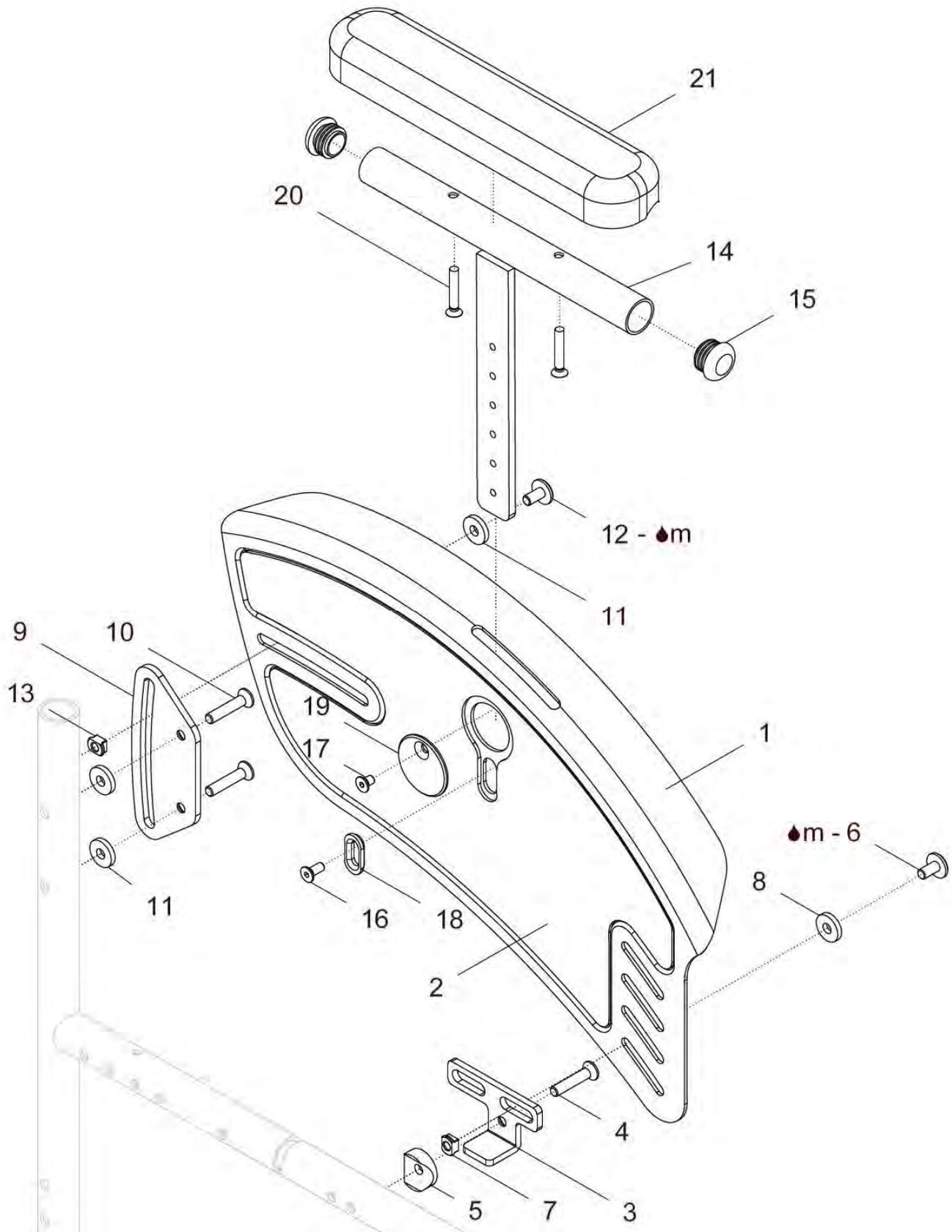Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	40 442 00	Kleiderschutz Ergo Al 22“ mit Armpolster kurz Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1a – 21	40 442 02	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1b – 21	40 442 03	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (für Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	40 444 00	Kleiderschutz Ergo Al 24“ mit Armpolster kurz Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 Paar
1c – 21	40 444 02	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1d – 21	40 444 03	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links mit Armpolster kurz kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für Rücken gerade) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
8 – 13	40 431 10	Halterung ERGO AL hinten rechts / links kpl.	2 Satz
9	40 431 12	Halter hinten (bei Rücken gerade)	2 St.
10	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	4 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	6 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13	40 431 11	Nutzenstein M6 / SW8	2 St.
14 – 21	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
14	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
15	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
16	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
17	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
18	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo AI (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
19	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
20	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
21	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz bei 30°-Rücken / Zahnsegmente

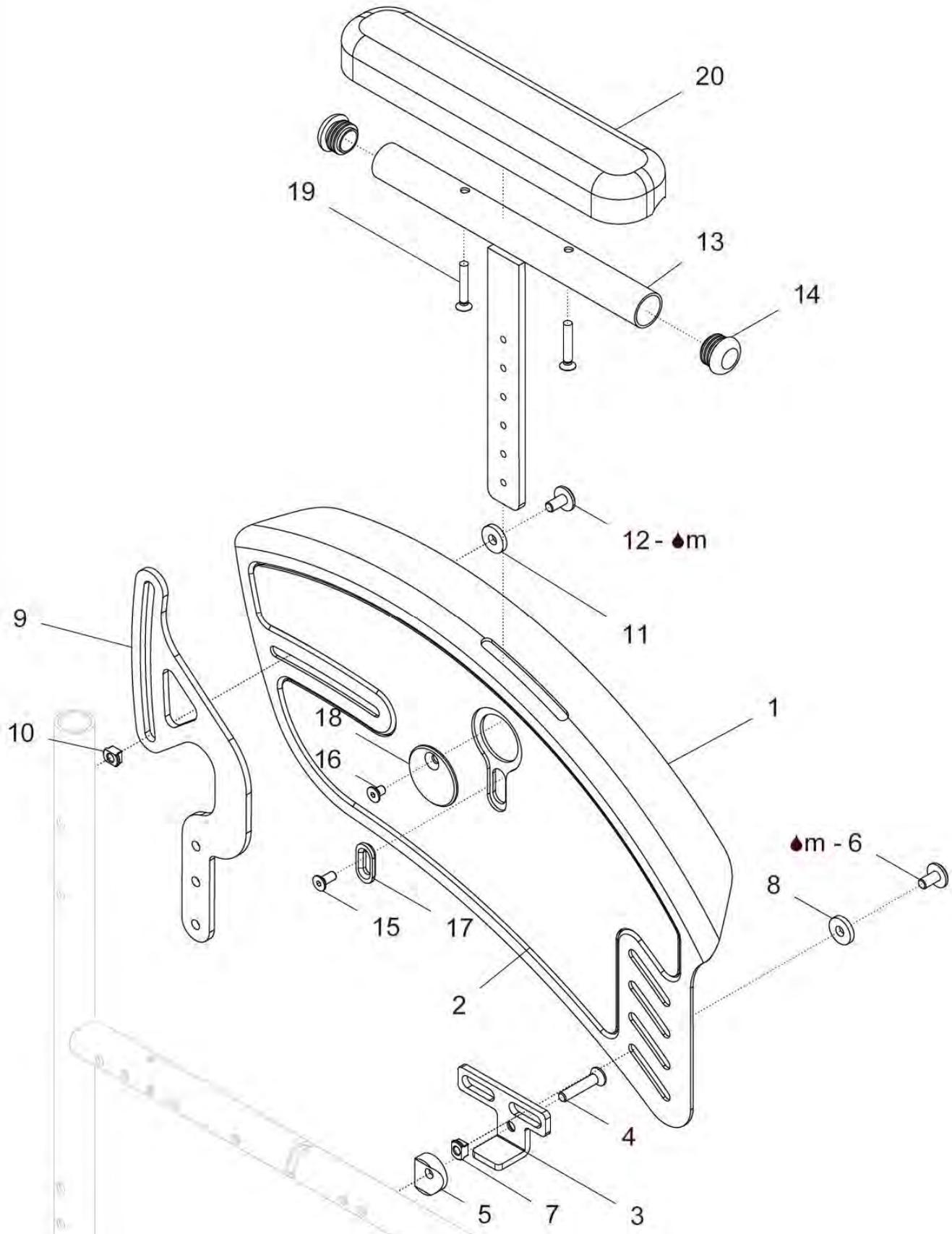

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 442 10	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1a – 20	40 442 12	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1b – 20	40 442 13	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 444 10	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz/30°-Rü./Zahnseg. Pa. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 Paar
1c – 20	40 444 12	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1d – 20	40 444 13	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armpolster kurz/30°-R./Za. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für 30°-Rücken / Zahnsegmente) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	40 431 40	Halterung ERGO AL hinten 30°-Rü./Zahnseg. re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 41	Halter hinten (bei 30°-Rücken / Zahnsegmente)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:

Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

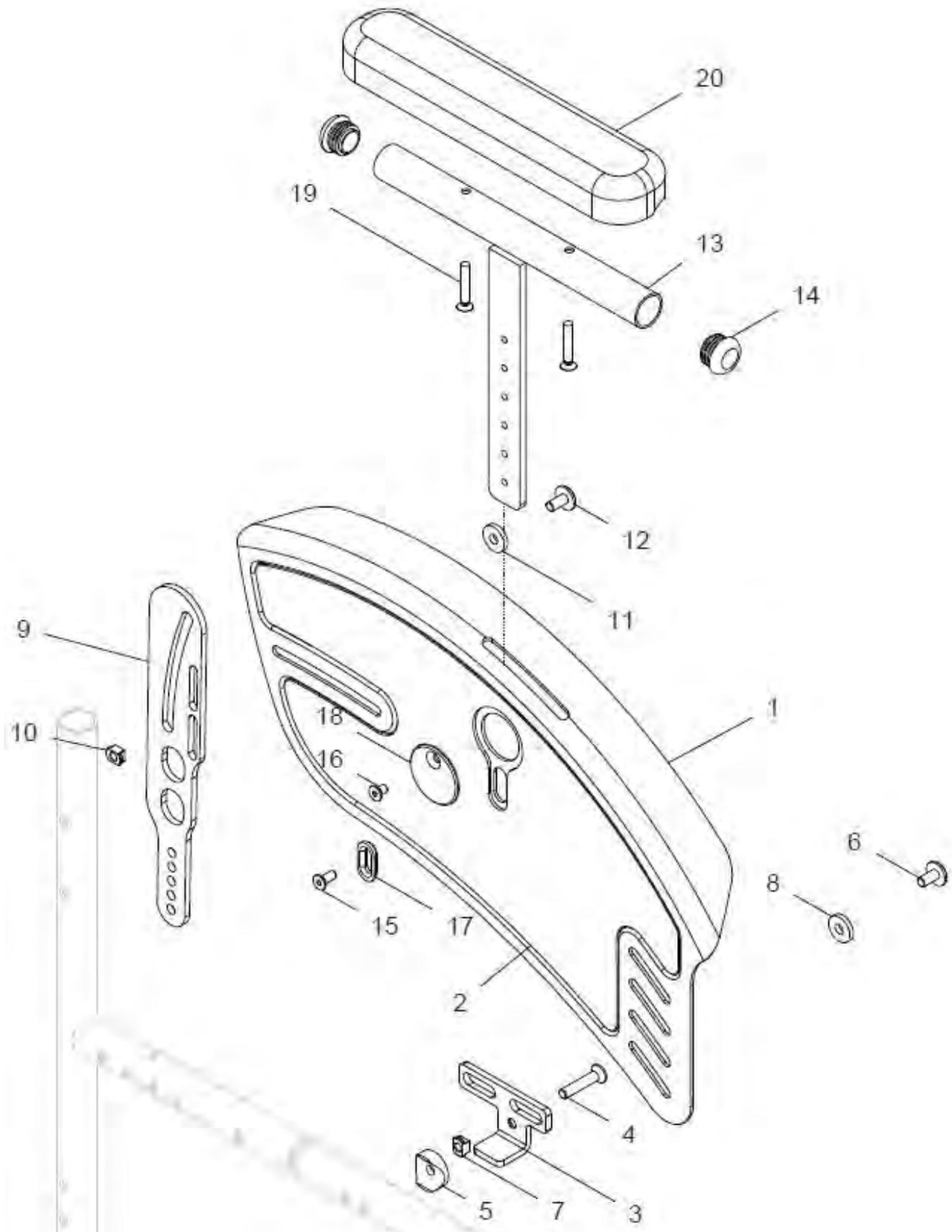Kleiderschutz ERGO AL mit Armpolster kurz bei UNITOMIC-Rücken

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 442 40	Kleiderschutz Ergo Al 22“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1a – 20	40 442 42	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITMOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1b – 20	40 442 43	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1a – 2a	40 442 20	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1b – 2b	40 442 30	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1a	40 442 21	Kleiderschutz Ergo Al 22“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1b	40 442 31	Kleiderschutz Ergo Al 22“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349 A2	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	40 444 40	Kleiderschutz Ergo Al 24“ Armp. kurz / UNITOMIC-Rü. Paar kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 Paar
1c – 20	40 444 42	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1d – 20	40 444 43	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links Armp. kurz/ UNITOMIC-Rü. kpl. mit Armpolster kurz angeschraubt mit Halterung vorne und hinten (für UNITOMIC-Rücken) FM: ?	1 St.
1c – 2a	40 444 20	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1d – 2b	40 444 30	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links (für Armpolster anschr.) kpl. mit Kälteschutz (ohne Halterung / ohne Armpolsterhalter) FM: ?	1 St.
1c	40 444 21	Kleiderschutz Ergo Al 24“ rechts für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
1d	40 444 31	Kleiderschutz Ergo Al 24“ links für Armpolster anschraubbar FM: ?	1 St.
2a	40 444 22	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ rechts für Armpolster anschr.	1 St.
2b	40 444 32	Kälteschutz für Kleiderschutz 22“ / 24“ links für Armpolster anschr.	1 St.
3a – 8	40 431 20	Halterung ERGO AL vorne rechts kpl.	1 Satz
3b – 8	40 431 30	Halterung ERGO AL vorne links kpl.	1 Satz
3a	40 431 21	Halter vorne rechts	1 St.
3b	40 431 31	Halter vorne links	1 St.
4	01 120 14	Senkkopfschraube M6x30 - DIN 7991	2 St.
5	50 321 11	Halbschale 6,2	2 St.
6	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.
7	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
8	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
9 – 12	40 431 70	Halterung ERGO AL hinten UNITOMIC-Rücken re. / li. kpl.	2 Satz
9	40 431 71	Halter hinten (bei UNITOMIC-Rücken)	2 St.
10	40 431 11	Nutenstein M6 / SW8	2 St.
11	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 - DIN 7349	2 St.
12	01 193 14	Innen 6-kt Schraube flach M6x12 ZNS	2 St.

13 – 20	40 443 00	Armpolsterhalter mit Armpolster kurz und Drehscheibe kpl. mit Drehscheibe, Intarsie und Befestigung links und rechts verwendbar	2 St.
13	50 415 51	Armpolsterhalter kurz (für rechts und links)	2 St.
14	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	4 St.
15	01 120 01A	Senkschraube M5x10 - DIN 7991 A2	2 St.
16	01 120 01	Senkschraube M5x8 - DIN 7991 A2	2 St.
17	40 431 82	Intarsie für Kleiderschutz Ergo Al (f. Armpolster anschraubbar)	2 St.
18	40 431 81	Drehscheibe für Armpolsterhalter	2 St.
19	01 121 02	Linsensenkschraube M5x30 - DIN 966	4 St.
20	04 100 01	Armpolster kurz	2 St.


Alternativen zu Halter Pos. 3:**Halter hoch (bei niedrigen Sitzhöhen)**

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3c	40 431 51	Halter vorne rechts hoch	1 St.
3d	40 431 61	Halter vorne links hoch	1 St.

Halter lang (bei Rahmenteil +30mm nach hinten)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
3e	40 431 56	Halter vorne rechts lang	1 St.
3f	40 431 66	Halter vorne links lang	1 St.

Therapeutisch geklemmt am Rahmen

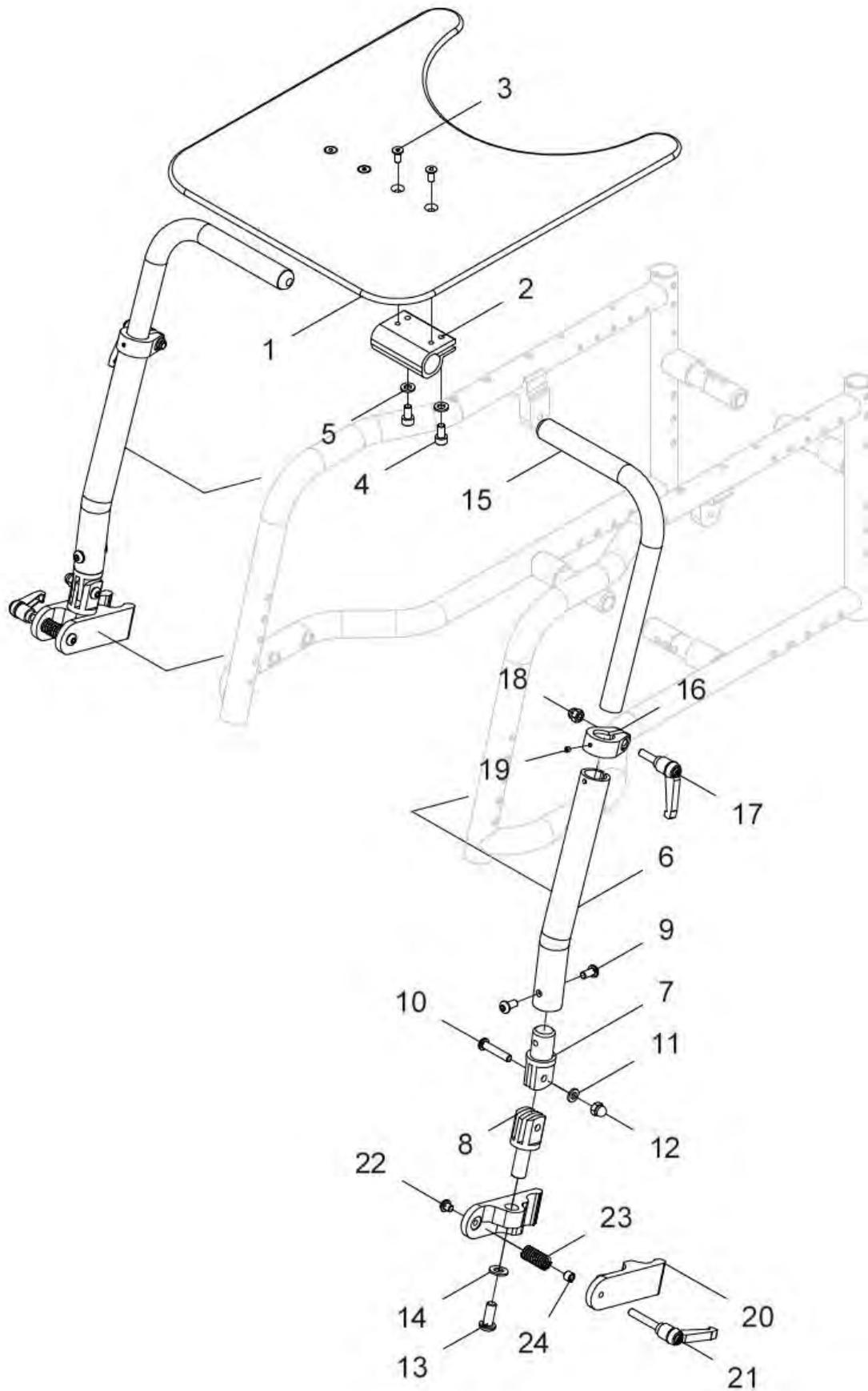


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	20 461 00	Therapietisch mit Halterung am Rahmen geklemmt kpl Therapietischplatte PC mit Halterung / Gestänge und mit Klemmhalter für Rahmen Ø23mm SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1 - 5	20 461 40	Therapietischplatte mit Tischaufnahme kpl. Therapietischplatte PC mit Tischaufnahme (ohne Halterung / Gestänge) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1a	20 461 81	Therapietischplatte 250 LB 0 B250xT300 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 20cm	1 St.
1b	20 461 82	Therapietischplatte 250 LB 20 B250xT300 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen Abduktion SB 20cm	1 St.
1c	20 461 83	Therapietischplatte 300 LB 0 B300xT350 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 22cm	1 St.
1d	20 461 84	Therapietischplatte 300 LB 20 B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 24 – 26cm	1 St.
1e	20 461 85	Therapietischplatte 300 LB 60 B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen Abduktion SB 22 – 26cm	1 St.
1f	20 461 86	Therapietischplatte 350 LB 50 B350xT380 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 28cm	1 St.
1g	20 461 87	Therapietischplatte 350 LB 70 B350xT380 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 30 - 32cm Rahmen Abduktion SB 28 - 32cm	1 St.
1h	20 461 88	Therapietischplatte 400 LB 100 B400xT400 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 34 - 36cm Rahmen Abduktion SB 34 - 36cm	1 St.
1i	20 461 89	Therapietischplatte 450 LB 150 B450xT450 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 38 - 48cm Rahmen Abduktion SB 38 - 48cm	1 St.
2 - 24	20 461 05	Halterung für Therapietisch am Rahmen geklemmt kpl Tischaufnahme mit Halterung / Gestänge und Klemmhalter für Rahmen Ø23mm (ohne Therapietischplatte) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
2a	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch bei SB 20 – 22cm	1 St.
2b	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch ab SB 24cm	2 St.
3a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
3b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 ab SB 24cm	4 St.
4a	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz bei SB 20 – 22cm	2 St.
4b	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz ab SB 24cm	4 St.

5a	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2	bei SB 20 – 22cm	2 St.
5b	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2	ab SB 24cm	4 St.
6 – 19	20 461 20	Führungsrohr rechts für Therapietisch SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?		1 St.
6 – 19	20 461 30	Führungsrohr links für Therapietisch SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?		1 St.
6	20 461 21	Teleskoprohr (Führungsrohr) rechts / links		2 St.
7	20 461 22	Drehpunktaufnahme für Teleskoprohr		2 St.
8	20 461 23	Drehpunktaufnahme für Klemmhalter		2 St.
9	01 154 20	Linsenkopfschraube M6x12 – ISO 7380 ZNS		4 St.
10	01 156 69	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380F ZNS		2 St.
11	01 320 62	Scheibe A6,4 – ISO 7090 ZNS		2 St.
12	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS		2 St.
13	01 154 40	Linsenkopfschraube M8x20 – ISO 7380 ZNS		2 St.
14	01 320 63	Scheibe A8,4 – ISO 7090 ZNS		2 St.
15a	20 461 51	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 1 Rahmen gerade SB 20 – 24cm		2 St.
15b	20 461 52	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 2 Rahmen gerade SB 26 – 32cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm		2 St.
15c	20 461 53	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 3 Rahmen gerade SB 34 – 42cm Rahmen Abduktion SB 26 – 32cm		2 St.
15d	20 461 54	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 4 Rahmen gerade SB 44 – 46cm Rahmen Abduktion SB 34 – 38cm		2 St.
15e	20 461 55	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 5 Rahmen Abduktion SB 40 – 46cm		2 St.
16 – 19	U24 212 30	Klemmschelle rechte Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)		1 Set
16 – 19	U24 212 20	Klemmschelle linke Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)		1 Set
16	U24 212 23	Klemmschelle rechts / links		2 St.
17	01 190 05	Klemmhebel M6x20 klein		2 St.
18	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS		2 St.
19	01 131 07	Gewindestift – M4x4 – ISO 4026 A2		2 St.
20 – 24	20 461 10	Klemmhalter für Therapietisch kpl. Klemmhalter für Ø23mm-Rohr (rechts und links verwendbar)		2 St.
20	20 461 11	Schenkel rechts / links		4 St.

21	01 190 07	Klemmhebel M6x35 klein	2 St.
22	01 156 61	Linsenkopfschraube M6x6 – ISO 7380F ZNS	2 St.
23	02 110 54	Druckfeder	2 St.
24	20 461 12	Abstandsbuchse	2 St.

Therapietisch gesteckt am Rahmen

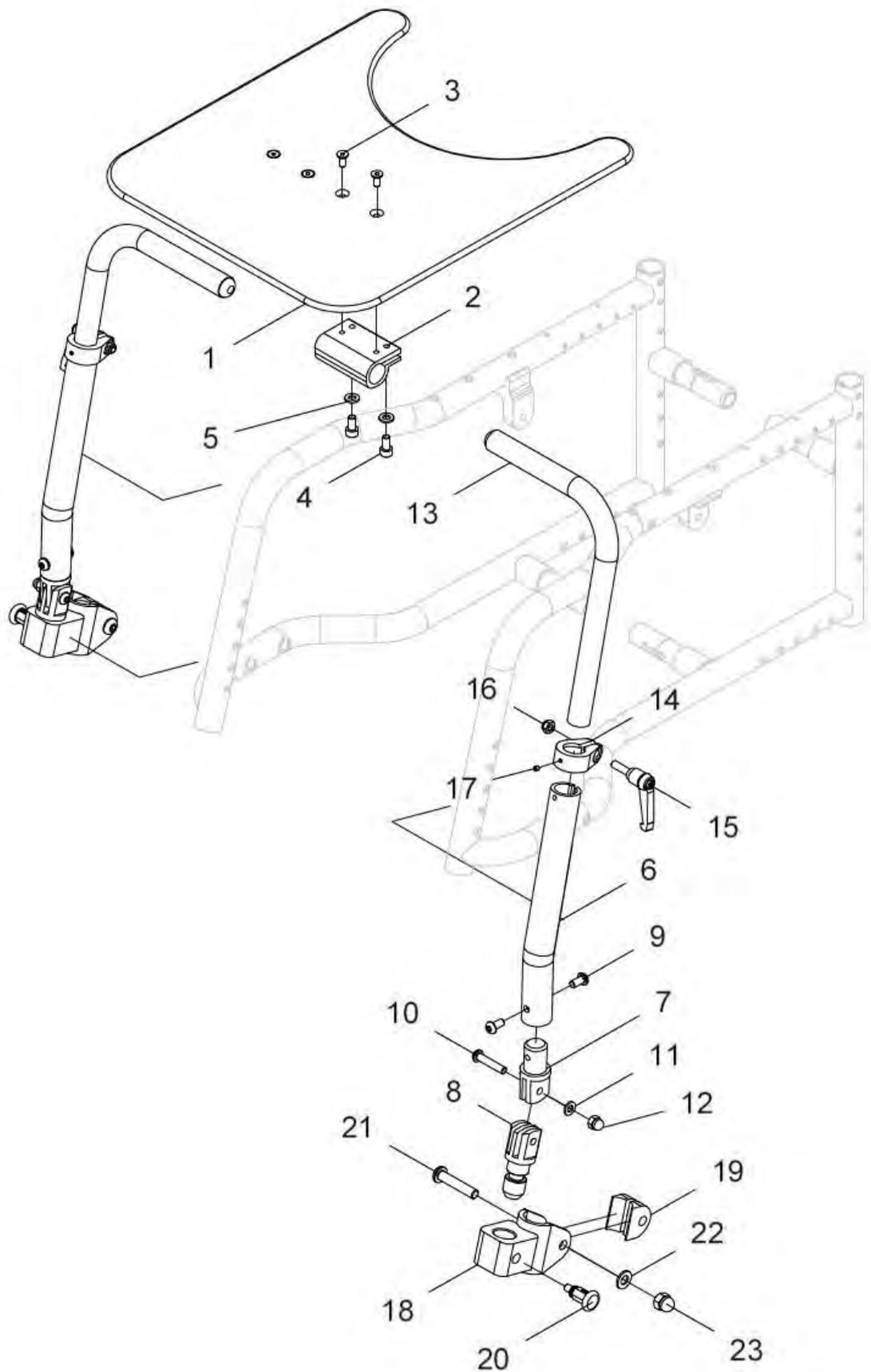


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 23	20 462 00	Therapietisch steckbar mit Halterung am Rahmen gesteckt kpl. Therapietischplatte PC mit Halterung / Gestänge und mit Führungsrohrhalter für Rahmen Ø23mm SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
1 - 5	20 461 40	Therapietischplatte mit Tischaufnahme kpl. Therapietischplatte PC mit Tischaufnahme (ohne Halterung / Gestänge) SB: ?	1 St.
1a	20 461 42	Therapietischplatte XS B250xT300 (für 1x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 20 – 22cm	1 St.
1b	20 461 43	Therapietischplatte S B250xT300 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 24cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm	1 St.
1c	20 461 44	Therapietischplatte M B300xT350 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 26 – 30cm Rahmen Abduktion SB 26 – 30cm	1 St.
1d	20 461 45	Therapietischplatte L B400xT400 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 32 – 40cm Rahmen Abduktion SB 32 – 40cm	1 St.
1e	20 461 46	Therapietischplatte XL B450xT450 (für 2x Tischaufnahme) Rahmen gerade SB 42 – 46cm Rahmen Abduktion SB 42 – 46cm	1 St.
2 - 23	20 462 05	Halterung steckbar für Therapietisch am Rahmen gesteckt kpl. Tischaufnahme mit Halterung / Gestänge und Führungsrohrhalter für Rahmen Ø23mm (ohne Therapietischplatte) SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
2a	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch bei SB 20 – 22cm	1 St.
2b	20 461 41	Tischaufnahme für Therapietisch ab SB 24cm	2 St.
3a	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
3b	01 120 02	Senkschraube M5x12 – DIN 7991 A2 ab SB 24cm	4 St.
4a	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz bei SB 20 – 22cm	2 St.
4b	01 160 70	Zylinderkopfschraube M6x10 – DIN 912 vz ab SB 24cm	4 St.
5a	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2 bei SB 20 – 22cm	2 St.
5b	01 320 02	Scheibe 6,4 – ISO 7090 A2 ab SB 24cm	4 St.
6 – 17	20 461 20	Führungsrohr rechts steckbar für Therapietisch steckbar SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
6 – 17	20 461 30	Führungsrohr links steckbar für Therapietisch steckbar SB: ? Rahmenform: gerade ? / Abduktion ?	1 St.
6	20 461 21	Teleskoprohr (Führungsrohr) rechts / links	2 St.
7	20 461 22	Drehpunktaufnahme für Teleskoprohr	2 St.


8	20 462 21	Drehpunktaufnahme steckbar für Führungsrohrhalter	2 St.
9	01 154 20	Linsenkopfschraube M6x12 – ISO 7380 ZNS	4 St.
10	01 156 69	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380F ZNS	2 St.
11	01 320 62	Scheibe A6,4 – ISO 7090 ZNS	2 St.
12	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS	2 St.
13a	20 461 51	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 1 Rahmen gerade SB 20 – 24cm	2 St.
13b	20 461 52	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 2 Rahmen gerade SB 26 – 32cm Rahmen Abduktion SB 20 – 24cm	2 St.
13c	20 461 53	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 3 Rahmen gerade SB 34 – 42cm Rahmen Abduktion SB 26 – 32cm	2 St.
13d	20 461 54	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 4 Rahmen gerade SB 44 – 46cm Rahmen Abduktion SB 34 – 38cm	2 St.
13e	20 461 55	Verbindungsrohr mit Abdeckkappe Gr. 5 Rahmen Abduktion SB 40 – 46cm	2 St.
14 – 17	U24 212 30	Klemmschelle rechte Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)	1 Set
14 – 17	U24 212 20	Klemmschelle linke Seite für Therapietisch kpl. Klemmschelle mit Klemmhebel M6x20 und Mutter M6 und Gewindestift für rechte Seite (Klemmhebel steht außen)	1 Set
14	U24 212 23	Klemmschelle rechts / links	2 St.
15	01 190 05	Klemmhebel M6x20 klein	2 St.
16	01 210 73	Hutmutter M6 – DIN 986 ZNS	2 St.
17	01 131 07	Gewindestift – M4x4 – ISO 4026 A2	2 St.
18 – 23	20 462 10	Führungsrohrhalter für Therapietisch steckbar kpl. Führungsrohrhalter für Ø23mm-Rohr mit Rastbolzen (rechts und links verwendbar)	2 St.
18	20 462 11	Führungsrohrhalter	2 St.
19	26 191 62	Distanzstück	4 St.
20	01 133 24	Rastbolzen	2 St.
21	01 154 43	Linsenkopfschraube M8x40 – ISO 7380F ZNS	2 St.
22	01 320 63	Scheibe A8,4 – ISO 7090 ZNS	2 St.
23	01 210 74	Hutmutter M8 – DIN 986 ZNS	2 St.

Fußbrett

Gruppe 5

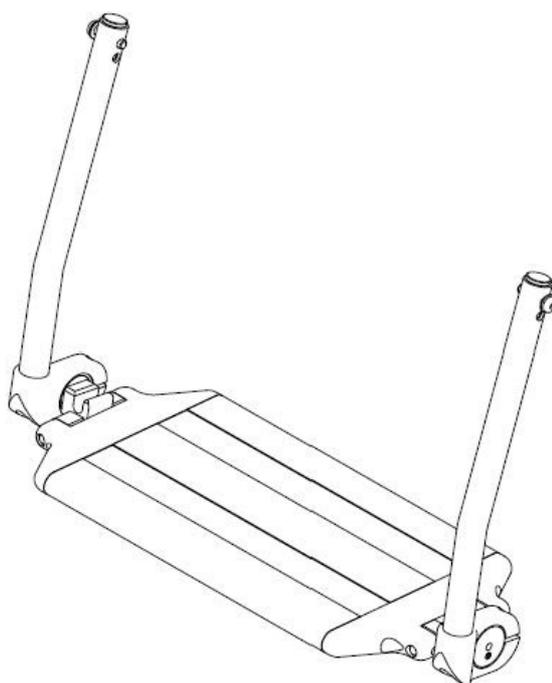


Fußbrett durchgehend Alu-Profil farbig

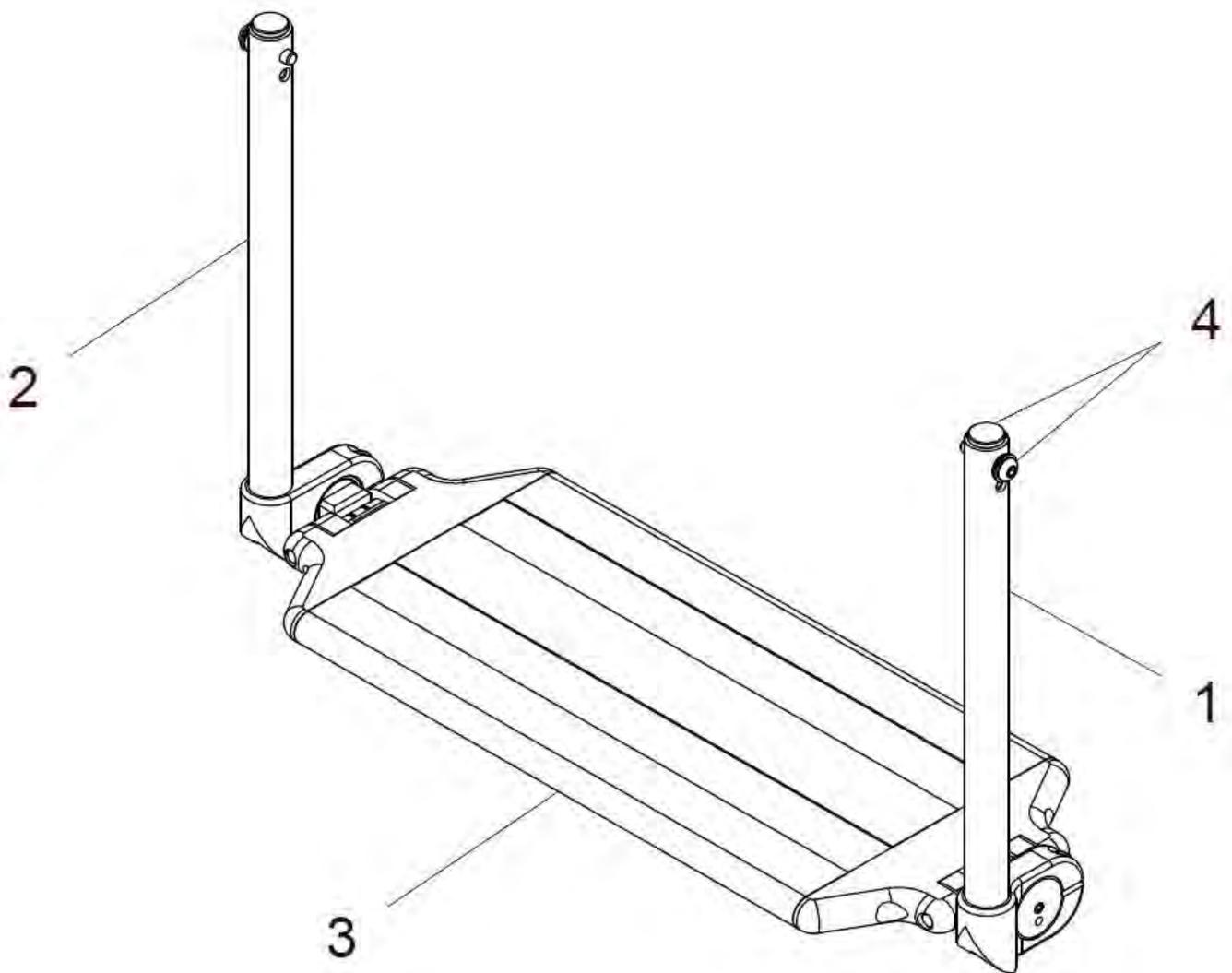


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	24 510 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	45 521 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorr-Scheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set

Fußbrett durchgehend mit FB-Halter Sprint (für LITTLE AR)

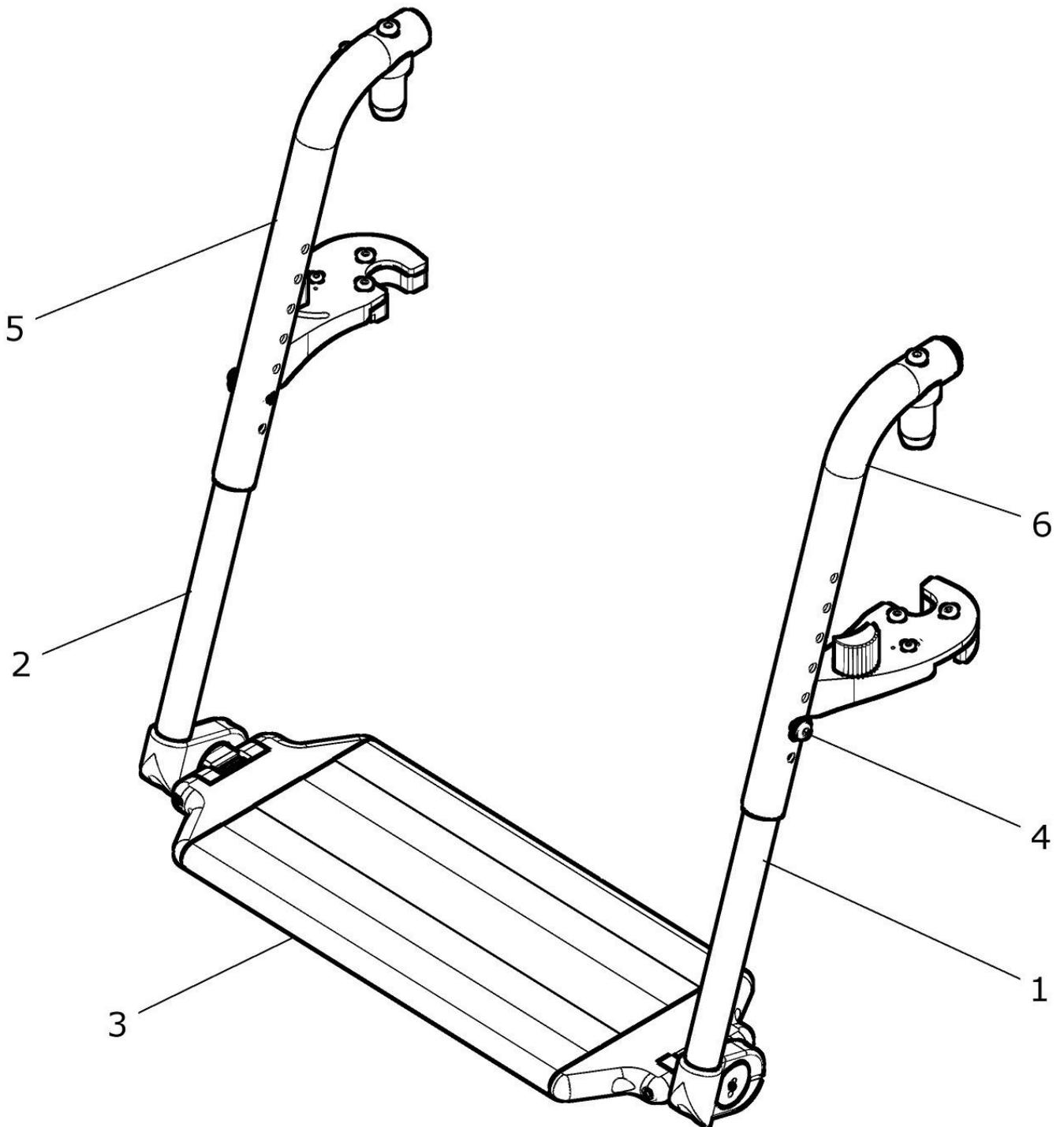

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 6	24 510 70	Fußbrett durchgehend (Profil) farbig m FB-Bügel u. FB-Halter kpl. mit Fußbrettbügel und Fußbretthalter mit SPRINT-Verriegelung SB.: ? FM FB-Halter / FB-Profil: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 - 4	24 510 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel (ohne Fußbretthalter) SB.: ? FM FB-Halter / FB-Profil: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	45 521 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	50 512 00	Fußbretthalter rechts mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.
6	50 513 00	Fußbretthalter links mit SPRINT-Verriegelung kpl. FM: ?	1 St.

Fußbrett (Alu-Profil) durchgehend farbig

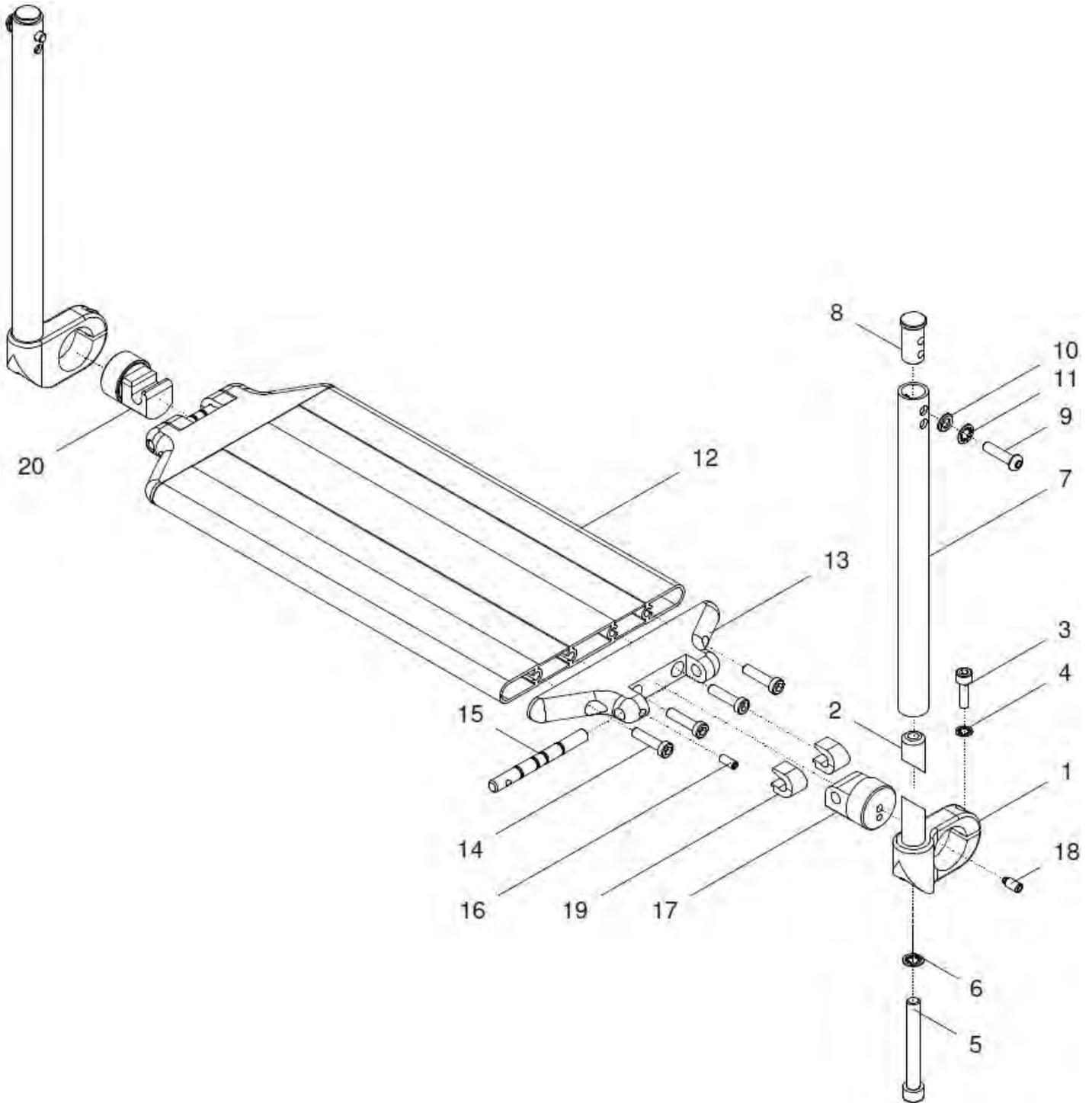

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	24 510 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Fußbrettbügel kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b - 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b - 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b - 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b - 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.

8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 20	45 521 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 521 81	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	1 St.
12b	45 521 86	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 - 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13 - 16, 19 - 20	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel aus Stahl mit Klemmaufnahme:


links:

1a – 6, 7h	50 525 55	Fußbrettbügel Stahl <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7g	50 525 60	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7e	50 525 68	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.
1a – 6, 7f	50 525 67	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> extra lang mit Klemm. links kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme links	1 St.

rechts:

1b – 6, 7h	50 524 55	Fußbrettbügel Stahl <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gerade lang (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7g	50 524 60	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnah. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen kurz (240mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7e	50 524 68	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnah. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen lang (320mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.
1b – 6, 7f	50 524 67	Fußbrettbügel Stahl <u>gebogen</u> extra lang mit Klemm. rechts kpl. Fußbrettbügel Stahl gebogen extra lang (360mm) mit Klemmaufnahme rechts	1 St.


Fußbrett durchgehend mit Spastikerverriegelung

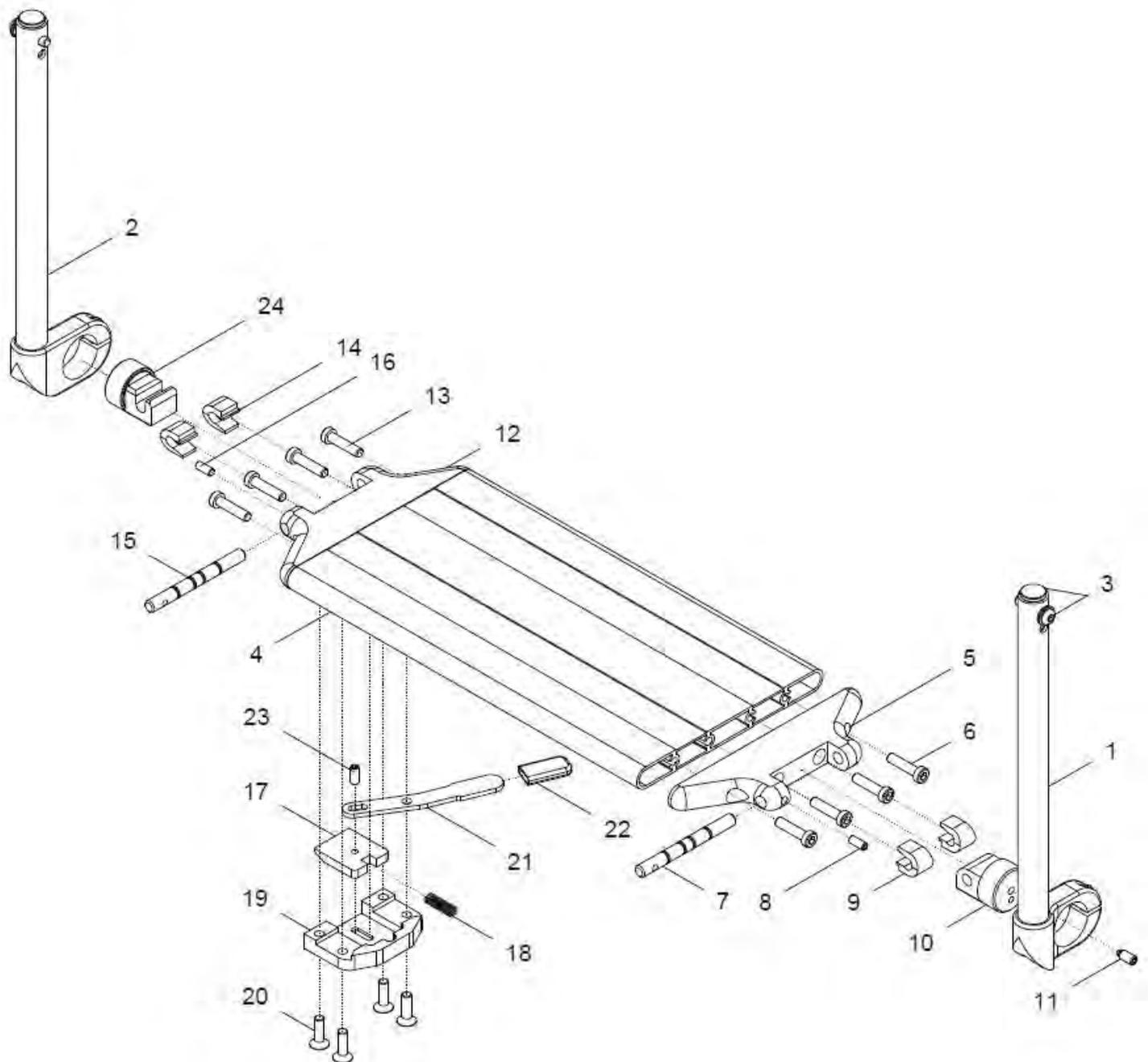

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 24	24 510 30	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 - 24	45 525 00	Fußbrett durchgehend. (Profil) farbig mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
4a	45 521 81	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	1 St.
4b	45 521 86	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
5 - 11	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.

5	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
6	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
7	40 521 23	Drehachse	1 St.
8	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
9	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
10	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
11	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
12 – 24	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
12	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
13	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
14	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17 – 23	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
17	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
18	02 110 05	Druckfeder	1 St.
19	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
20	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
21	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
22	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
23	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
24	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.

Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus

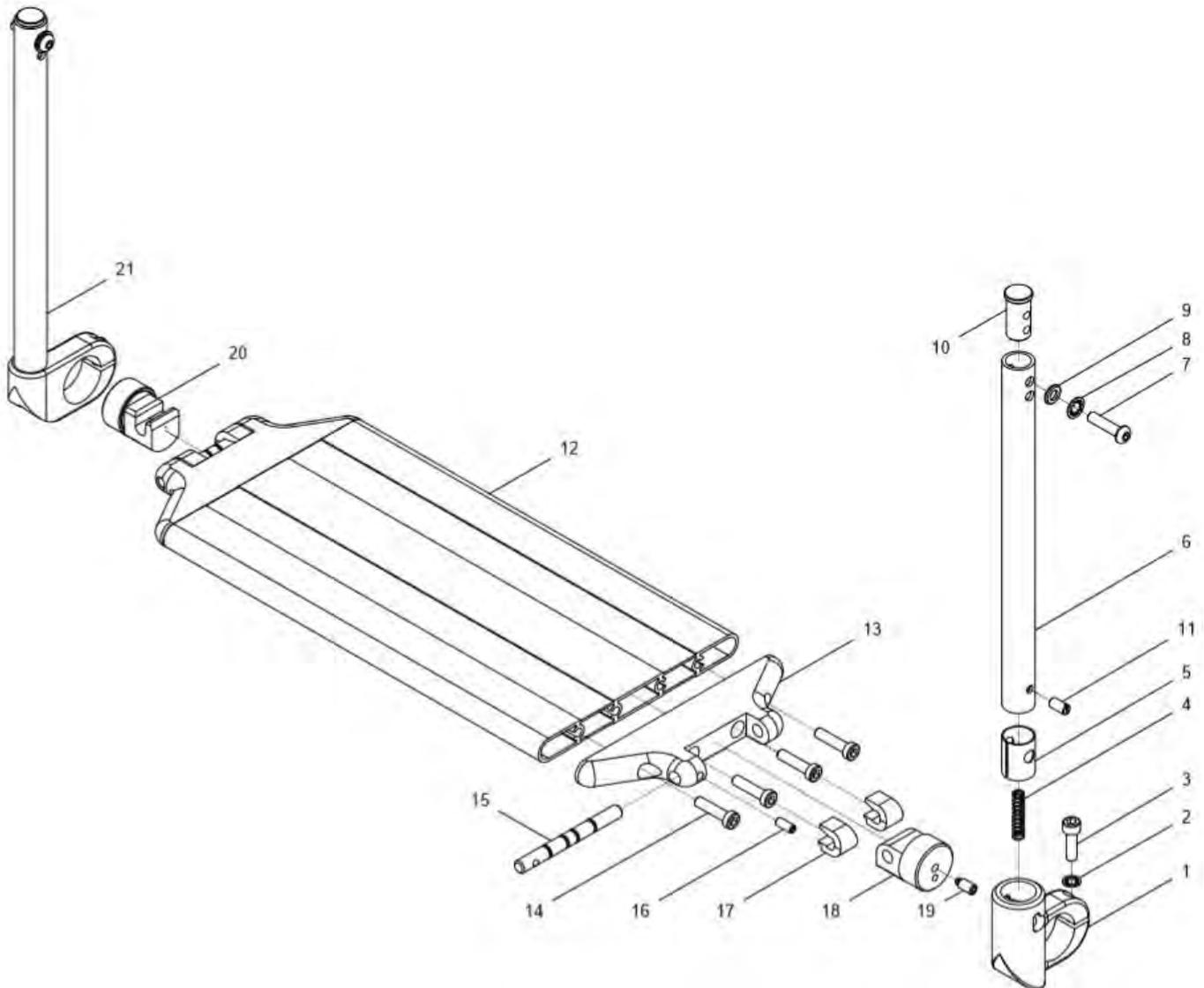


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 21a	24 510 40	Fußbrett durchghd. (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel abschw. kpl. und Abschwenkmechanismus links SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1a – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
12 – 20	45 525 00	Fußbrett durchghd. (Profil) farbig mit Gelenkbolzen und Auflager SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 521 81	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	1 St.

12b	45 521 86	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 – 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13 – 17, 20	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.
21a	40 526 50	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
21b	40 526 25	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.

Sonder-Ausführung: Abschwenkmechanismus rechts

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1b – 21	24 510 45	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) mit Fußbrettbügel abschw. und Abschwenkmechanismus rechts FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1b – 11	40 526 70	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts abschw. Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1b – 11	40 526 20	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts abschw. Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschw. (rechts)	1 St.
21c	40 526 80	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme links starr mit FB-Bügel links starr (nicht abschw. Seite) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
21d	40 526 35	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme links starr mit FB-Bügel links starr (nicht abschw. Seite) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.


Fußbrett durchgehend mit Abschwenkmechanismus links und mit Spastiker-verriegelung

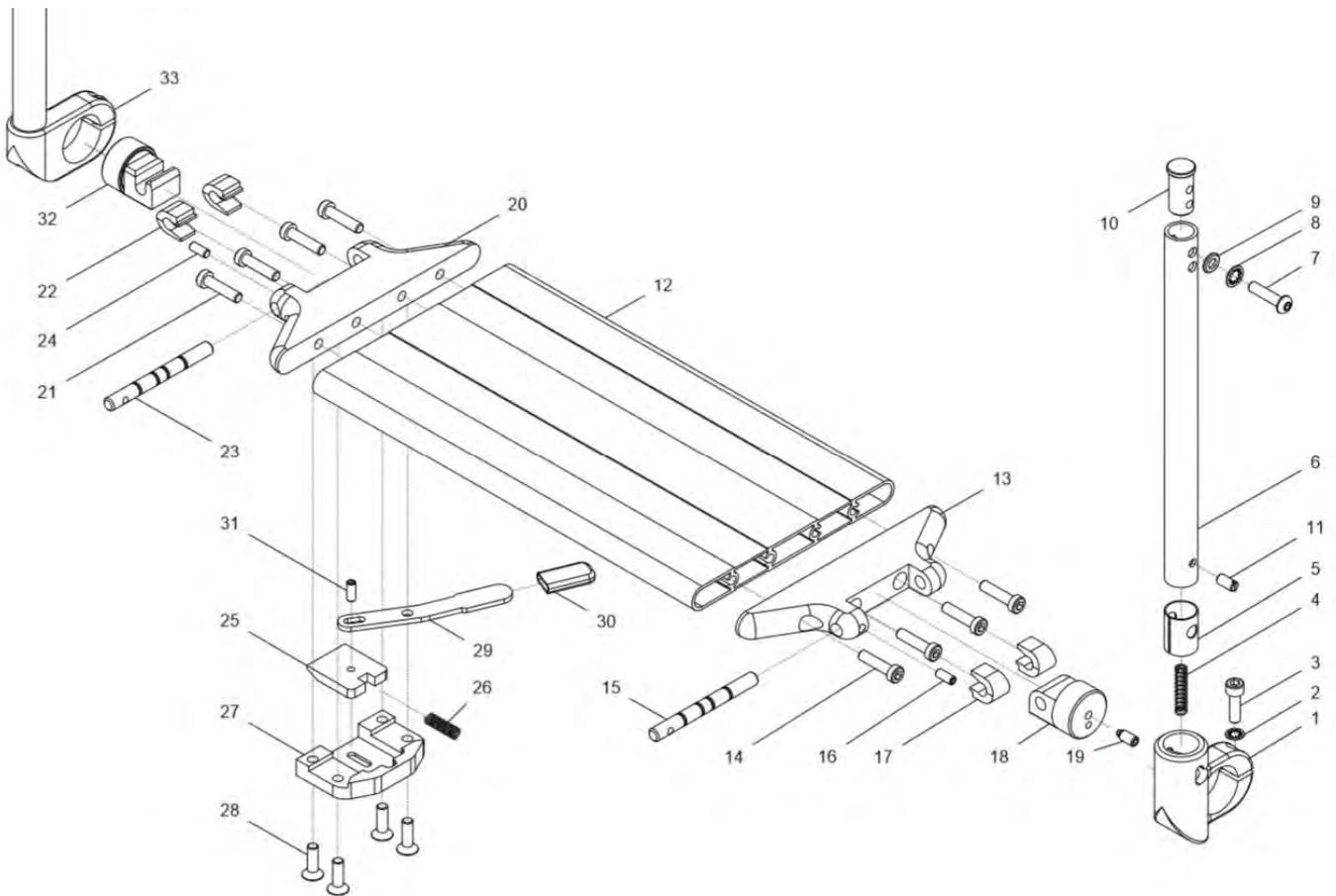

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 33	24 510 50	Fußbrett durchghd. (Profil) farbig mit Fußbrettbügel abschw. kpl. Fußbrett Alu-Profil mit Fußbrettbügel, Abschwenkmechanismus links und Spastikerverriegelung rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbar Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1 – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbar Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
12 – 32	45 525 00	Fußbrett durchgehend. (Profil) farbig mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 521 81	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	1 St.

12b	45 521 86	Fußbrett (Profil) durchgehend für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13 - 19	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
15	40 521 23	Drehachse	1 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
20 – 32	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
20	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
21	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
22	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
23	40 521 23	Drehachse	1 St.
24	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
25 – 31	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
25	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
26	02 110 05	Druckfeder	1 St.
27	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
28	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
29	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
30	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
31	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
32	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.
33a	40 526 50	Fußbrettbügel gerade mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
33b	40 526 25	Fußbrettbügel gebogen mit Klemmaufnahme rechts starr kpl. mit FB-Bügel rechts starr (nicht abschwenkbar) FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.

Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig

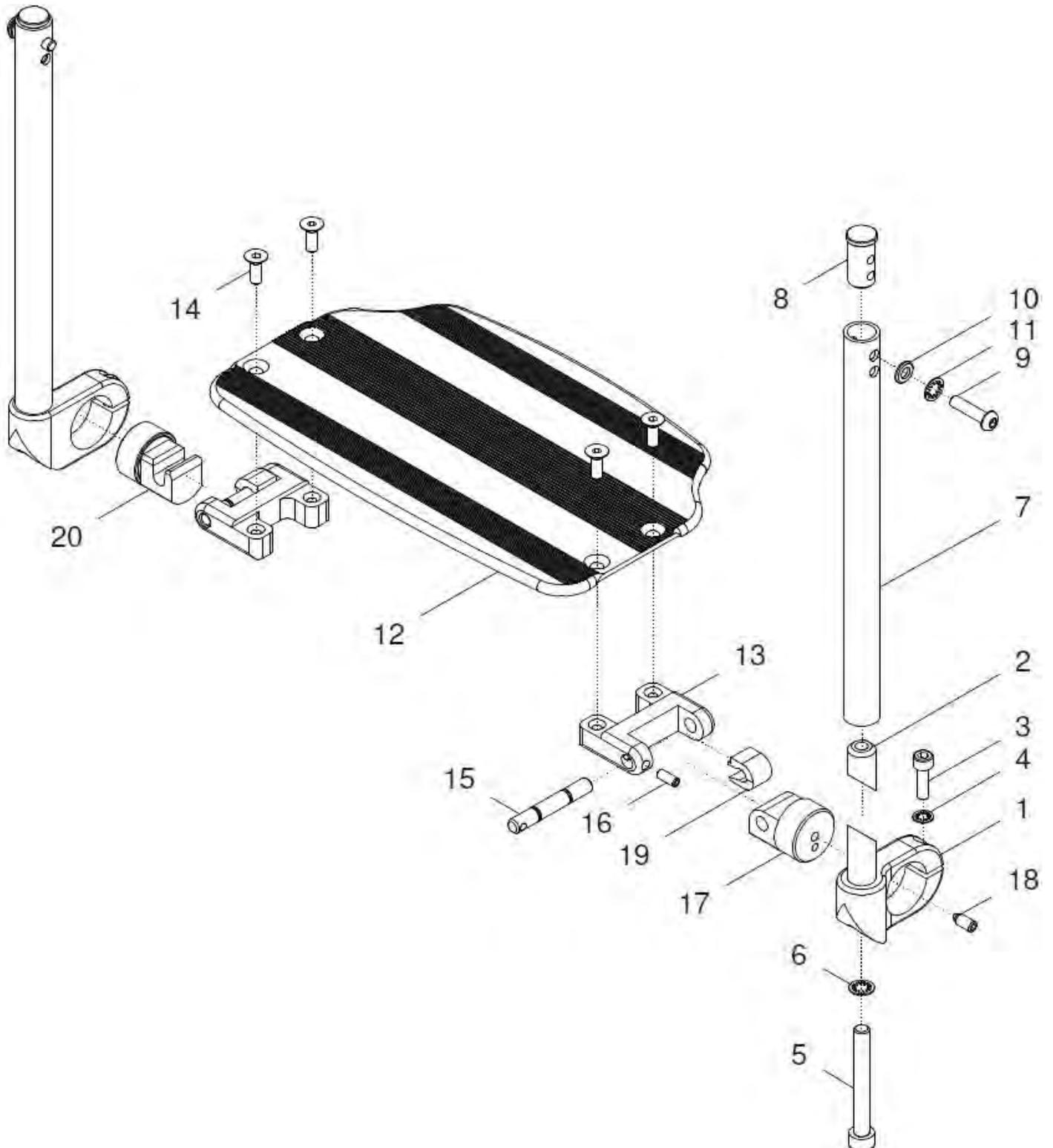


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	24 520 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) farbig mit FB-Bügel kpl. Fußbrett-Flach-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Fußbrettbügel SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b - 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b - 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b - 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b - 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.

8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorr Scheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 20	45 561 15	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12	45 561 45	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13 - 19	45 561 30	Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen kpl. (linke Seite)	1 St.
13 - 16, 19 - 20	45 561 20	Aufnahme für Fußbrett-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen kpl. (rechte Seite)	1 St.
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	1 St.
19	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
20	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Sonder-Fußbrettbügel:

7e	50 521 46A	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) / (Stahl)	1 St.
7f	50 521 47	Fußbrettbügel gebogen extra lang (360mm) / (Stahl)	1 St.
7g	50 521 48	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) / (Stahl)	1 St.
7h	50 521 49	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) / (Stahl)	1 St.

Fußbrettplatte durchgehend mit Fußbrettbügel hochklappbar

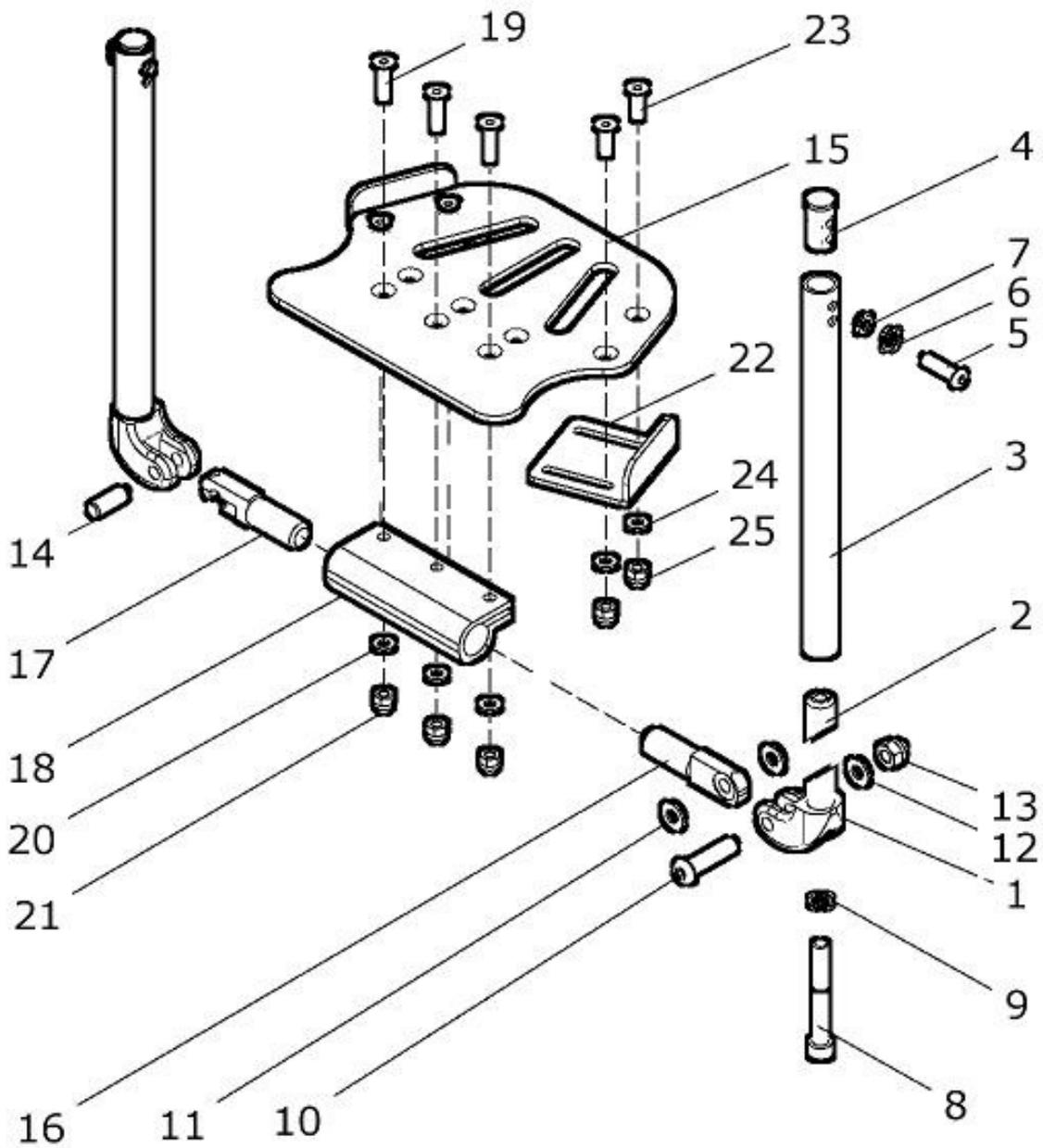


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	22 510 00	Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar mit Fußbrettbügel hochklappbar, Rahmen gerade FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	kpl. 1 St.
1 – 21	22 510 10	Fußbrettplatte durchgehend winkelverstellbar mit Fußbrettbügel hochklappbar, Rahmen Abduktion FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	kpl. 1 St.
1 – 13	40 563 00	Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme links mit Linsenkopfschraube FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	kpl. 1 St.
1 – 13	40 563 10	Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme links und Linsenkopfschraube FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	kpl. 1 St.
1 – 9, 14	40 562 00	Fußbrettbügel gerade mit Aufnahme rechts und Zylinderstift FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	kpl. 1 St.
1 – 9, 14	40 562 10	Fußbrettbügel gebogen mit Aufnahme rechts und Zylinderstift FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	kpl. 1 St.
1	45 511 03	Aufnahme für Fußbrett	2 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
3b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
3c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
3d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
4	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
6	01 330 01	Schnorr Sicherungsscheibe NM6	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 160 83B	Zylinderkopfschraube M8x50 - DIN 912	2 St.
9	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.

15 - 21	40 561 00	Fußbrettplatte durchgehend mit Drehgelenk und Hacken kpl. SB: ? FM: ?	1 St.
15a	85 511 05	Fußbrettplatte 200mm durchgehend Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 24 – 26cm FM.: ?	1 St.
15b	85 511 01	Fußbrettplatte 240mm durchgehend Rahmen gerade: SB 34 – 38cm Abduktionsrahmen: SB 28 – 32cm FM.: ?	1 St.
15c	85 511 08	Fußbrettplatte 280mm durchgehend Rahmen gerade: SB 40 – 44cm Abduktionsrahmen: SB 34 – 38cm FM.: ?	1 St.
16	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
17	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
18	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
19	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
20	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
21	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.


Optional:

22 - 25	70 520 50	Seitenschutz für Fußbrettplatte kpl.	1 Set
22	70 521 03	Seitenschutz	2 St.
23	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	4 St.
25	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	4 St.

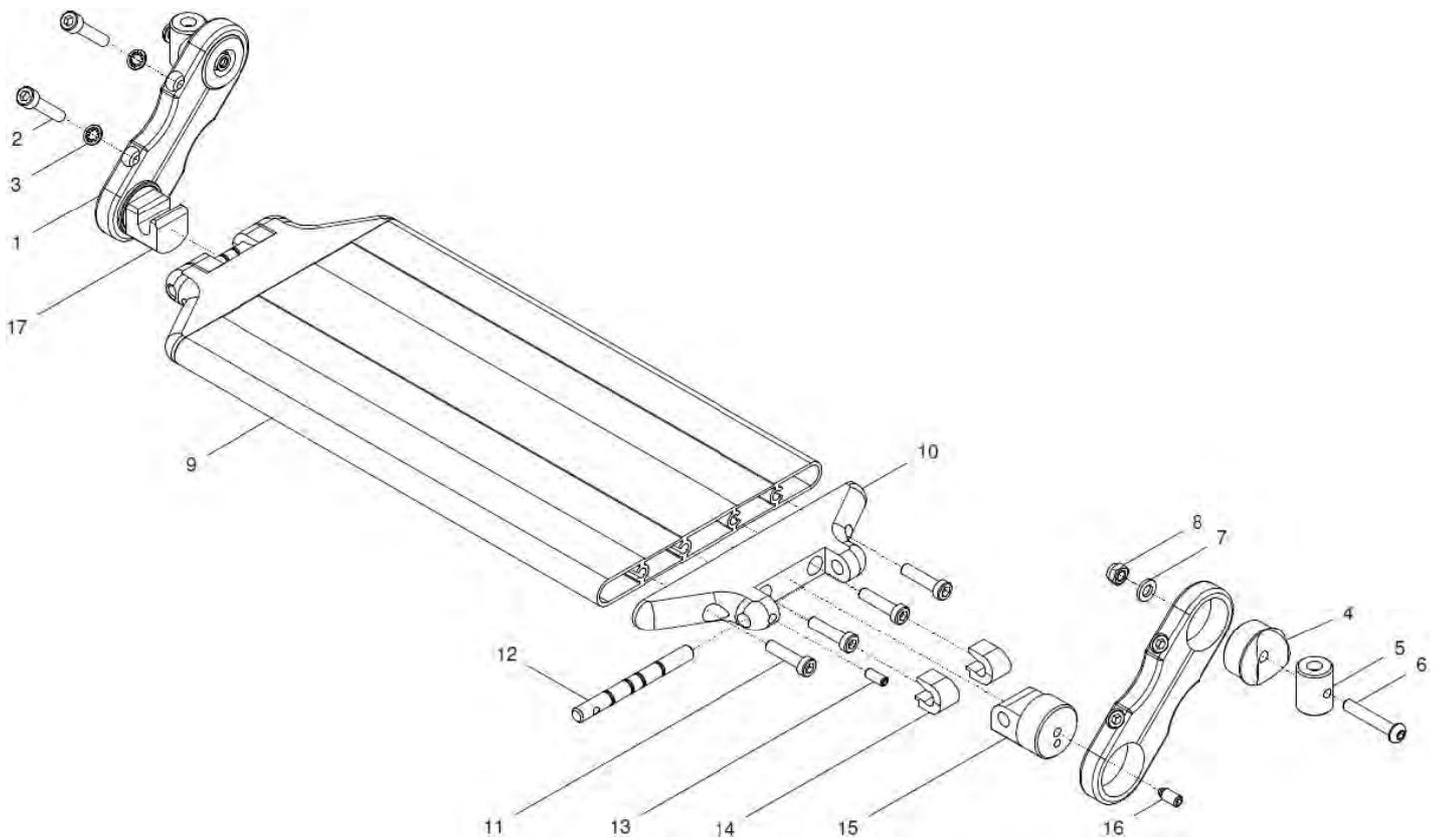Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	24 515 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen, ger. kpl. Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 - 17	24 515 10	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen, Abdu. kpl. Fußbrett-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a - 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 17	24 516 20	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.


9b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
10 – 16	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
10 – 14, 17	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
10	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
12	40 521 23	Drehachse	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
15	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
16	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
17	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

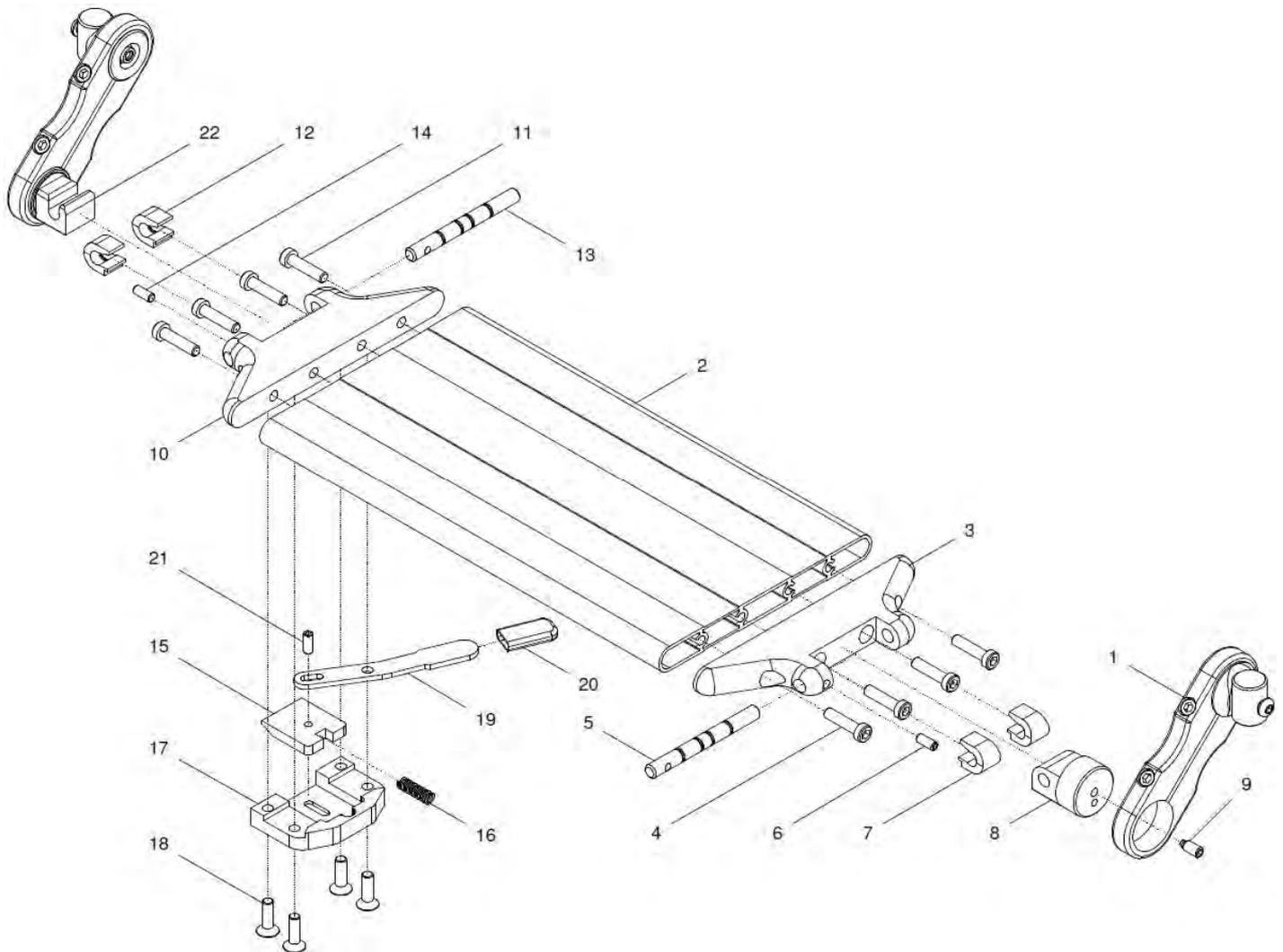Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen mit Spastikerverriegelung

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	24 515 05	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen, Spast. kpl. Fußbrett-Profil farbig im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlasche für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 - 22	24 515 15	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen, Spast. kpl. Fußbrett-Profil farbig im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
2 – 22	24 516 50	Fußbrett durchgehend (Profil) farbig im Rahmen m Spa.ver. kpl. Fußbrett-Profil farbig im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: ? SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
2a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.
2b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
3 – 9	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
3	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
4	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
5	40 521 23	Drehachse	1 St.
6	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.

7	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
8	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
9	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
10 – 22	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
10	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
12	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
13	40 521 23	Drehachse	1 St.
14	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
15 – 21	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
15	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
16	02 110 05	Druckfeder	1 St.
17	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
18	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
19	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
20	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
21	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
22	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.


Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt (mit FB-Bügel und Klemmlaschen)

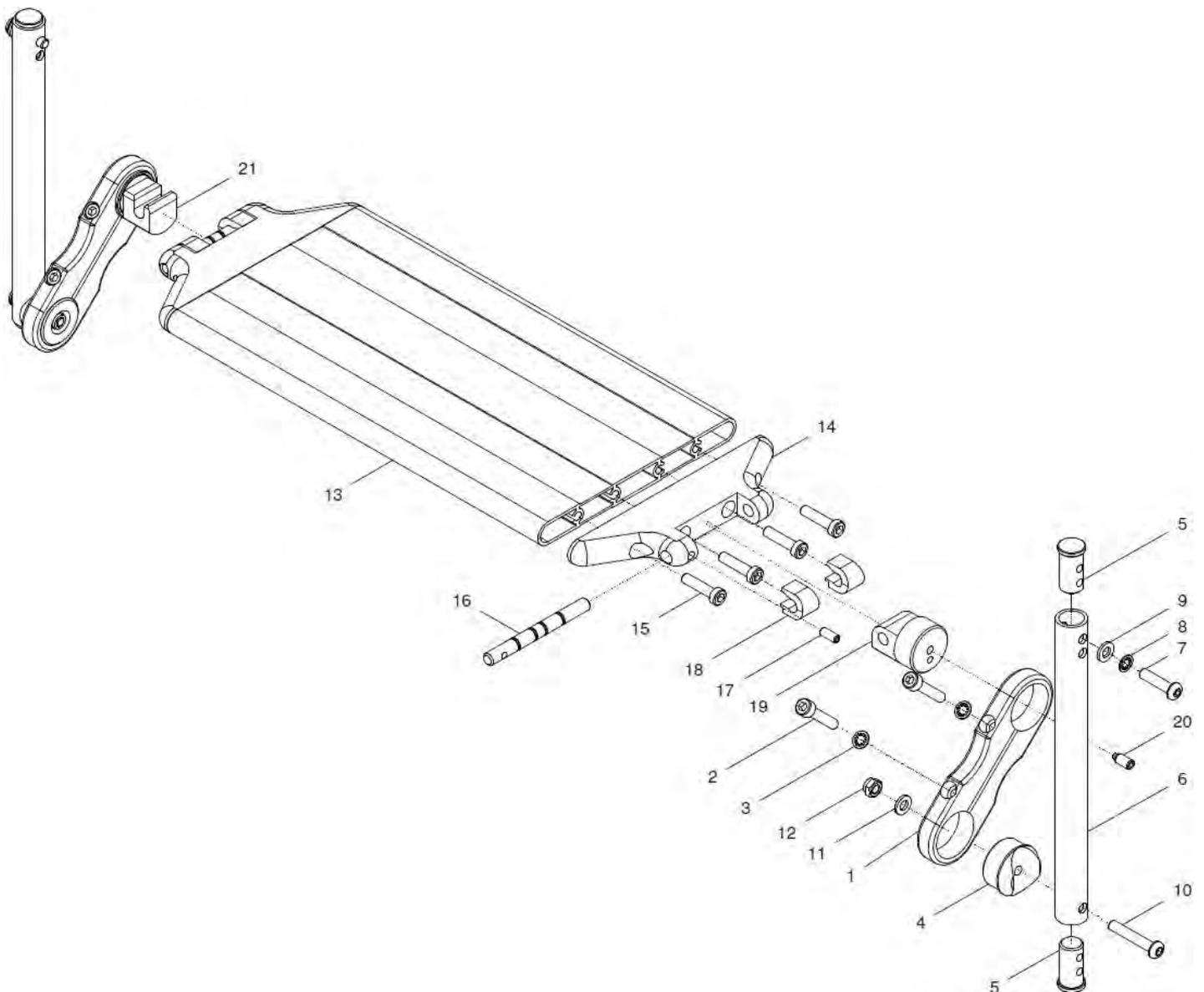

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	24 560 00	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig abgesetzt, gerade kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ?	1 St.
1 – 21	24 560 10	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig abgesetzt, Abdu. kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ?	1 St.
1 - 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 21	24 516 20	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.
13b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.

o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 20	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14 – 18, 21	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
16	40 521 23	Drehachse	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
21	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt mit Spastikerverriegelung (mit FB-Bügel und Klemmlaschen)

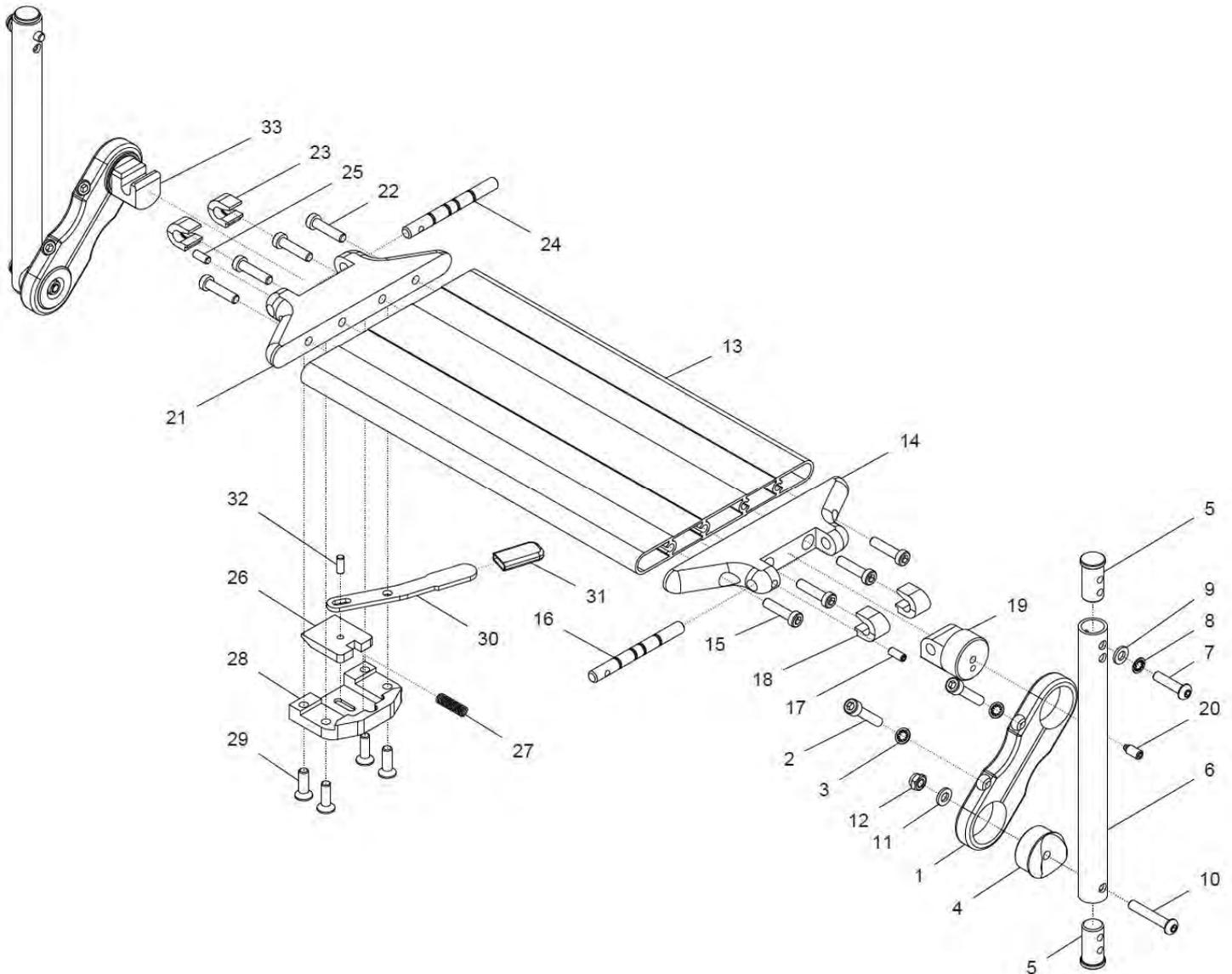


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12, 13a - 33	24 560 05	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig abges., ger., Spast. kpl. Fußbrett-Profil durchgehend farbig mit Spastikerverriegelung für FB abgesetzt, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ?	1 St.
1 – 12, 13b - 33	24 560 15	Fußbrett durchgehend. (Alu-Profil) farbig abges., Abdu., Spast. kpl. Fußbrett-Profil durchgehend farbig mit Spastikerverriegelung für FB abgesetzt, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ?	1 St.
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 33	24 516 50	Fußbrett durchgehend (Profil) farbig im Rahmen m Spa.ver. kpl. Fußbrett-Profil farbig im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: ? SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.

13a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.
13b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 20	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
16	40 521 23	Drehachse	1 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
21 – 33	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
21	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
23	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
24	40 521 23	Drehachse	1 St.
25	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
26 – 32	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
26	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
27	02 110 05	Druckfeder	1 St.
28	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
29	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
30	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
31	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
32	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
33	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.

**Fußbrett (Profil) durchgehend abgesetzt und abschwenkbar
oder**

**Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert und abschwenkbar
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)**

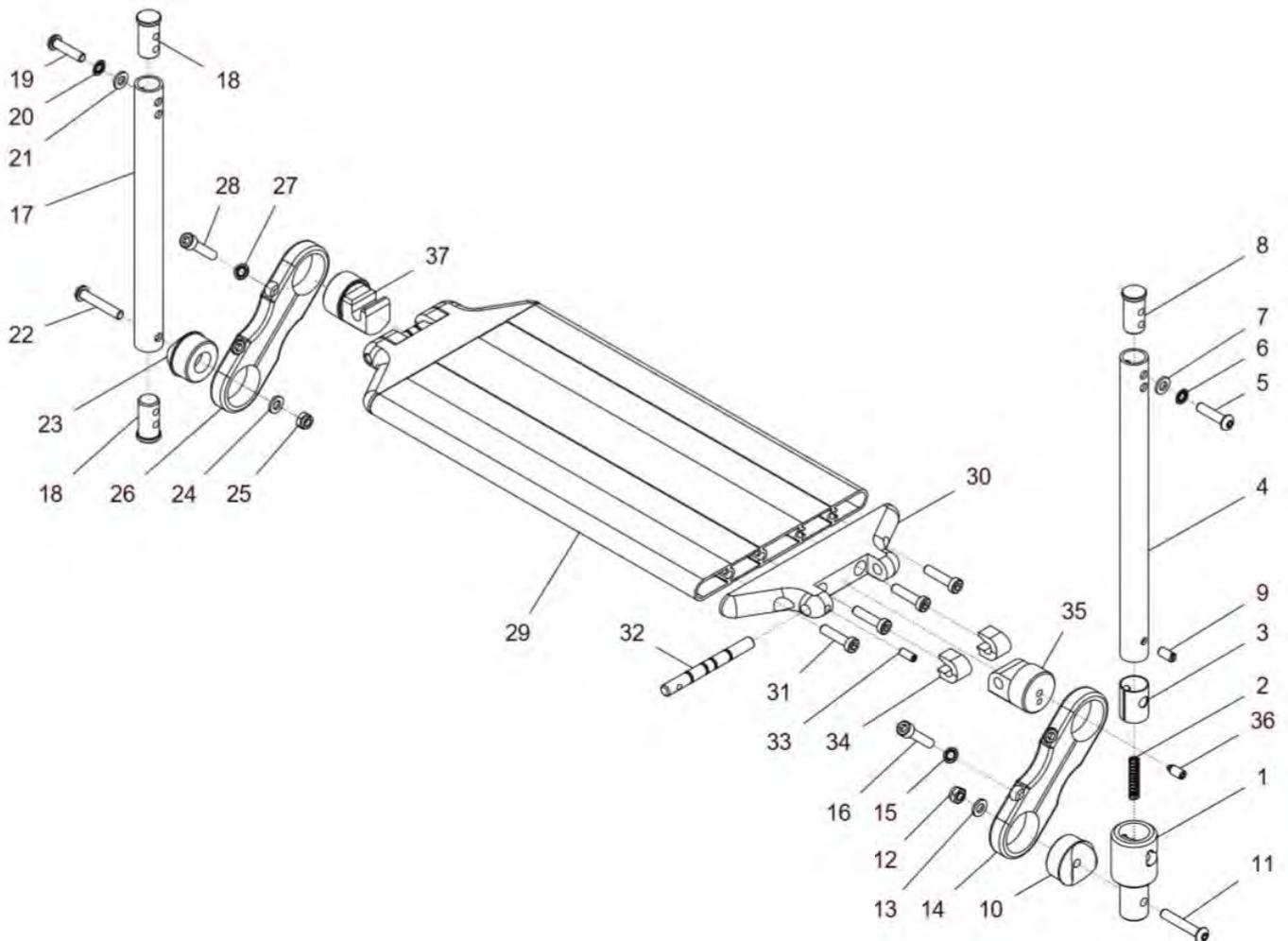


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 37	24 560 40	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rah., abschw. kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 – 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschw. und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 – 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschw. kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschw.	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschw.	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 – 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 – 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 37	24 516 20	Fußbrett durchgehend (Alu-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen Länge FB-Profil wie im Rahmen montiert SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
29a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.
29b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
30 – 36	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30 – 34, 37	40 521 40	Endstück-Fußbrett mit Auflager und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
31	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
32	40 521 23	Drehachse	2 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
34	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
35	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
36	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
37	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Fußbrett (Profil) durchgehend im Rahmen montiert / abgesetzt und abschwenkbar und mit Spastikerverriegelung

(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

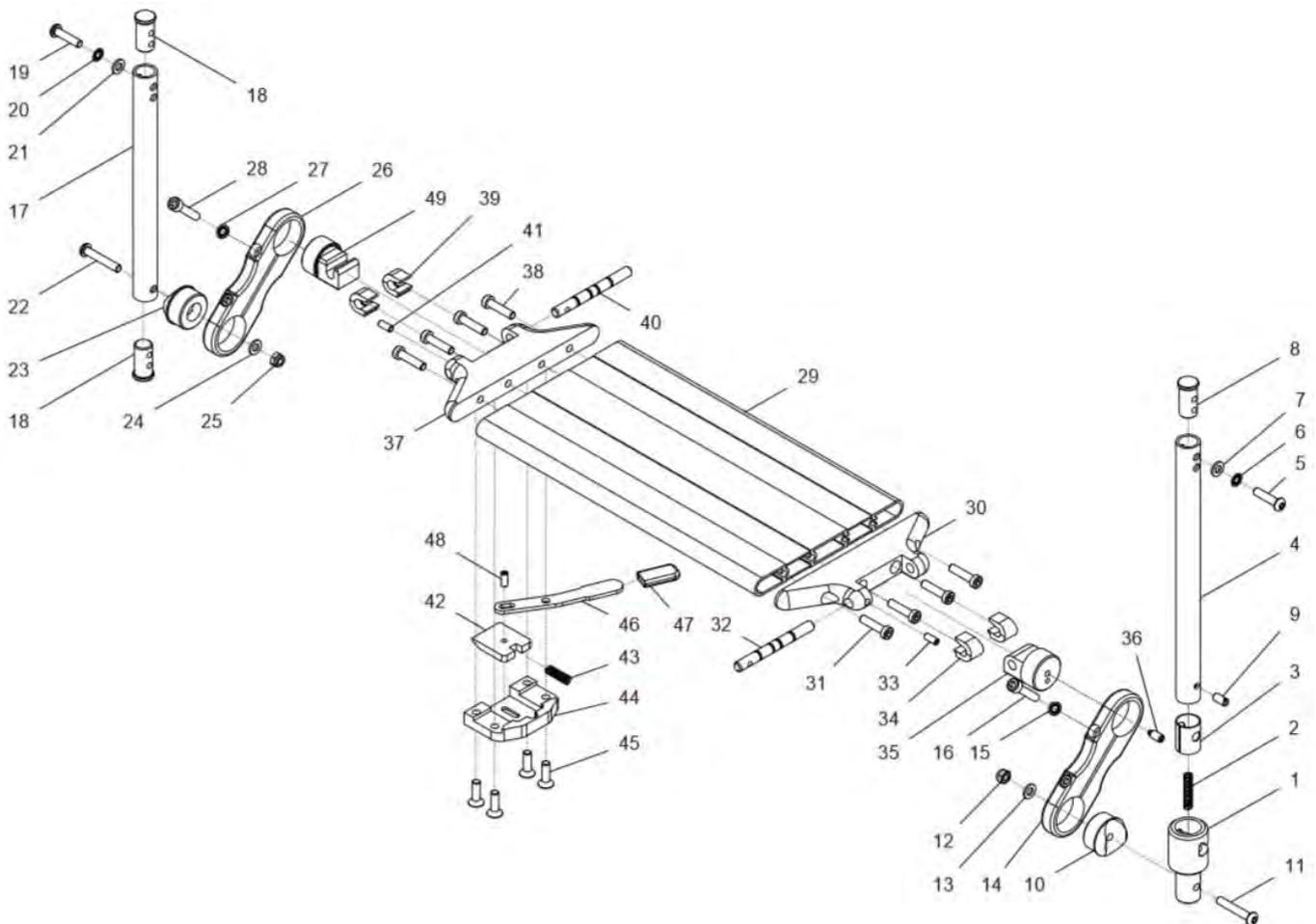


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 49	24 560 45	Fußbrett durchgd. (Alu-Profil) farbig im Rah. abschw./Spast. kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 – 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschw. und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 – 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschw. kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschw.	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschw.	1 St.
5 - 8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.

19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 49	24 516 50	Fußbrett durchgehend (Profil) farbig im Rahmen m Spa.ver. kpl. Fußbrett-Profil farbig im Rahmen montiert mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen (ohne Klemmlasche / ohne Fußbretthalter) FM: ? SB: ? Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
29a	24 516 31	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	1 St.
29b	24 516 36	Fußbrett (Profil) durchgehend farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	1 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
30 – 36	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	1 St.
30	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	1 St.
31	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
32	40 521 23	Drehachse	1 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
34	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
35	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
36	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
37 – 49	40 551 00	Spastikerverriegelung (rechts) kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Auflager für Spastikerverriegelung	1 St.
37	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	1 St.

38	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
39	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
40	40 521 23	Drehachse	1 St.
41	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
42 – 48	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	1 St.
42	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	1 St.
43	02 110 05	Druckfeder	1 St.
44	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	1 St.
45	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	4 St.
46	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	1 St.
47	04 210 82	Flachkappe rot	1 St.
48	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	1 St.
49	40 551 05	Auflager Fußbrettprofil mit Ring für Spastikerverriegelung	1 St.

Fußbrett flach durchgehend im Rahmen montiert (Flach-Profil)

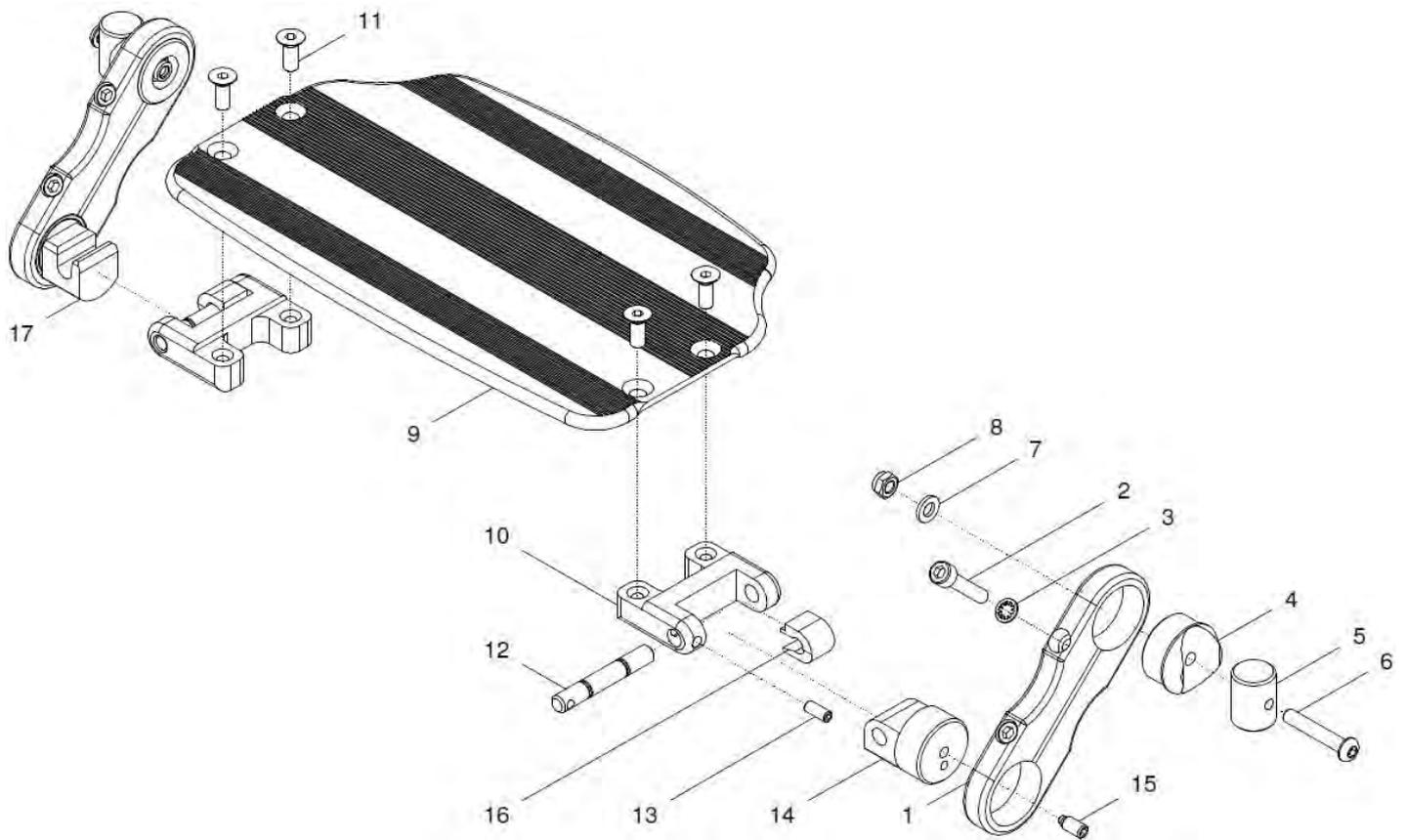


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	24 525 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) farbig im Rahmen kpl. Fußbrett-Flach-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm) Rahmenform: ? (gerade / Abduktion)	1 St.
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b – 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c – 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 – 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 17	24 526 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9	24 526 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
10 – 16	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen kpl. (linke Seite)	1 St.
10 – 13, 16 – 17	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen kpl. (rechte Seite)	1 St.

LITTLE AR / SLT

10	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert	2 St.
11	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
12	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
15	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
16	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
17	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

**Fußbrett Flach-Profil durchgehend abgesetzt
(mit FB-Bügel und Klemmlasche)**

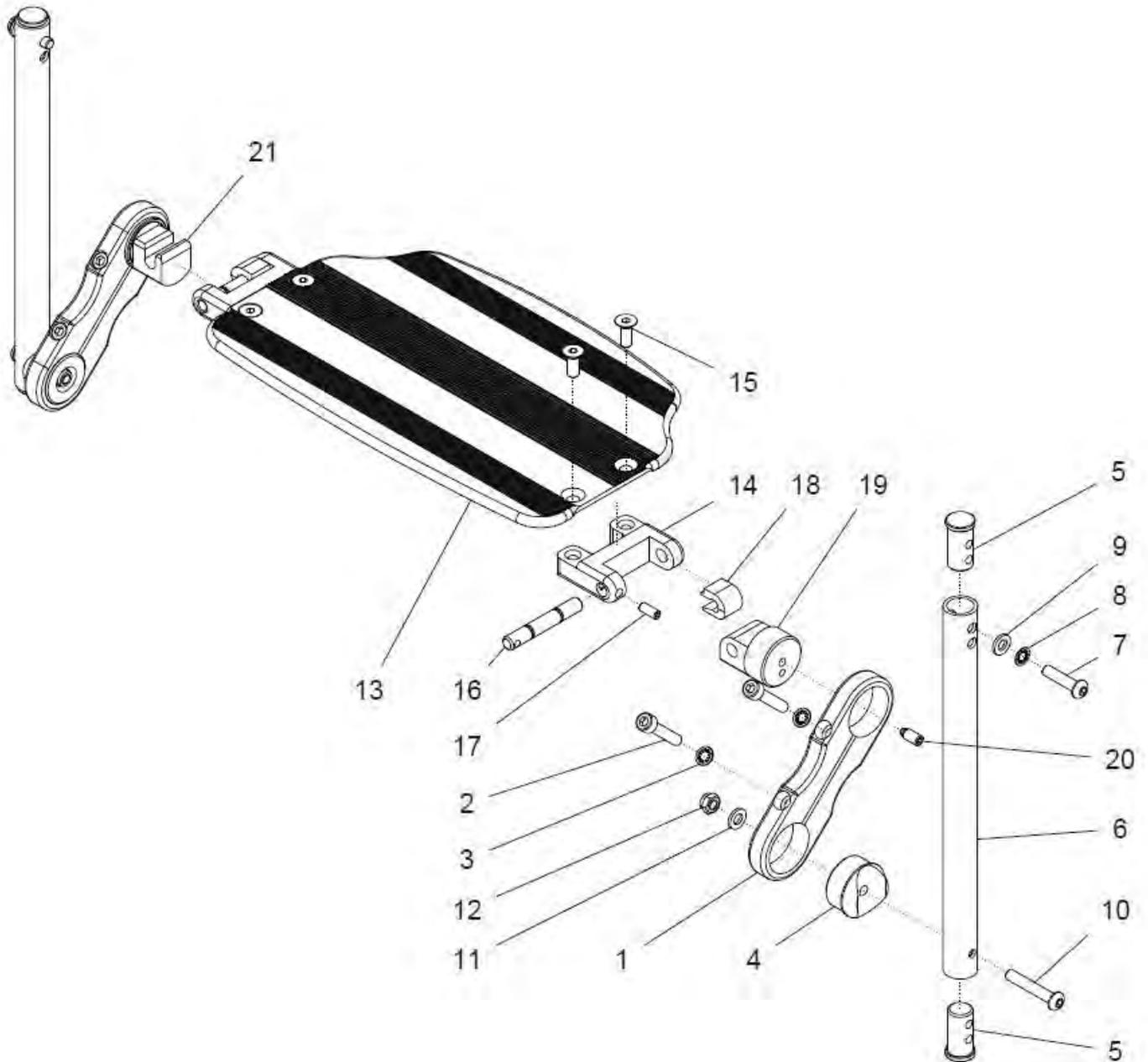


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	24 570 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) farbig abgesetzt kpl. Fußbrett-Flach-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen 85mm SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 - 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 21	24 526 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13	24 526 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
14 – 20	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen kpl. (linke Seite)	1 St.
14 – 18, 21	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen kpl. (rechte Seite)	1 St.
14	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettfachprofil im Rahmen montiert	2 St.
15	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.

LITTLE AR / SLT

16	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
19	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
21	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.

Fußbrett flach durchgehend im Rahmen montiert und abschwenkbar (Flach-Profil)


(mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

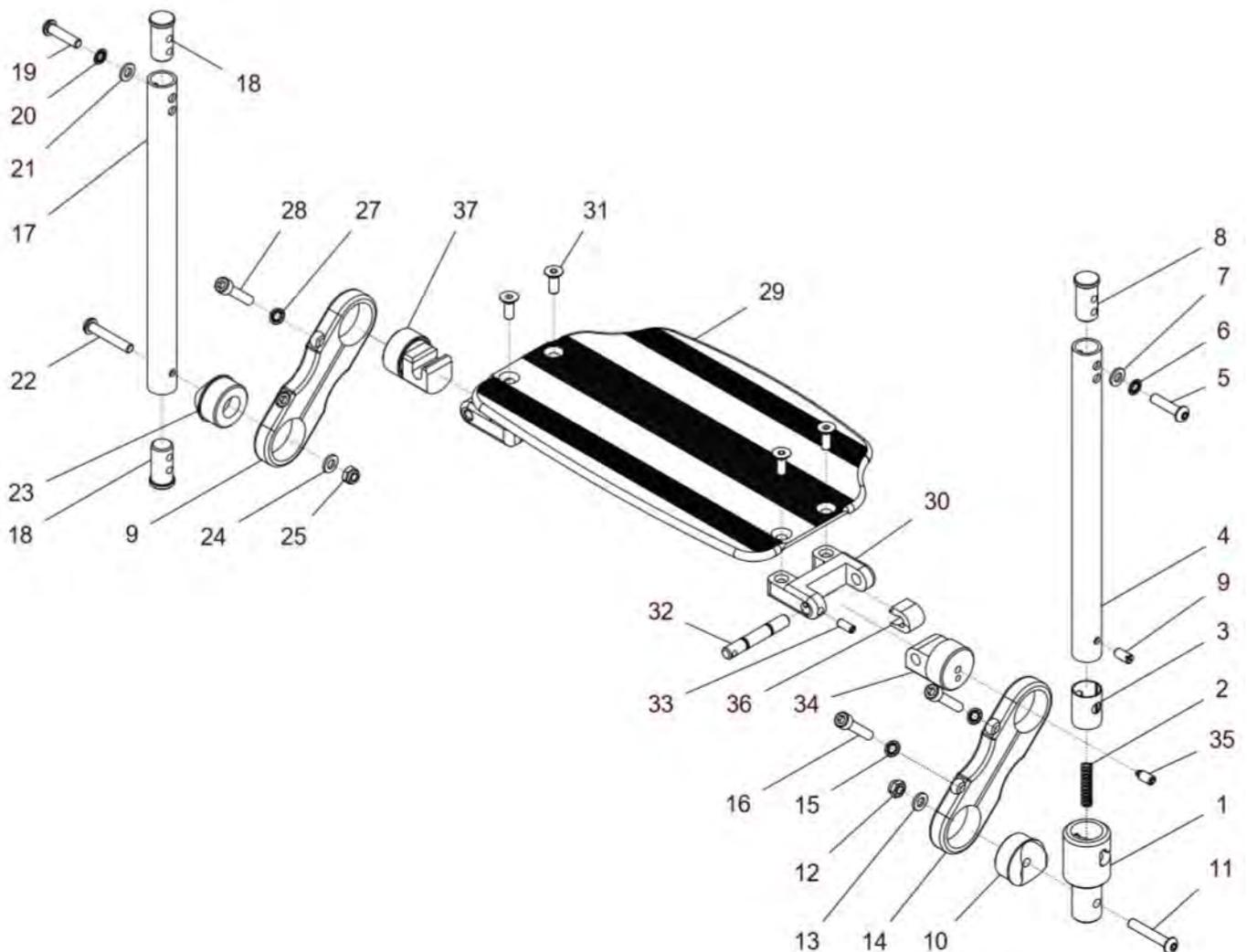

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 37	24 570 40	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) farbig abges./ abschw. kpl. Fußbrett-Flach-Profil farbig mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen 85mm (abgesetzt / im Rahmen montiert) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 - 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. u. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschw. und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 - 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschw. kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschw.	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschw.	1 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschw. (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.

20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 37	24 526 00	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig im Rahmen mit Gelenkbolzen und Auflagerbolzen (ohne Klemmlaschen) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
29	24 526 50	Fußbrett flach durchgehend (Flach-Profil) farbig SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
30 – 36	45 561 38	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Gelenkbolzen und mit Achsbolzen kpl. (linke Seite)	1 St.
30 – 33, 36 – 37	45 561 28	Aufnahme für Fußbrettf-Fachprofil mit Auflager und mit Achsbolzen kpl. (rechte Seite)	1 St.
30	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettfachprofil im Rahmen montiert	2 St.
31	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
32	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
33	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
34	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	1 St.
35	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	1 St.
36	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.
37	40 521 05	Auflager Fußbrett mit Ring	1 St.


Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert

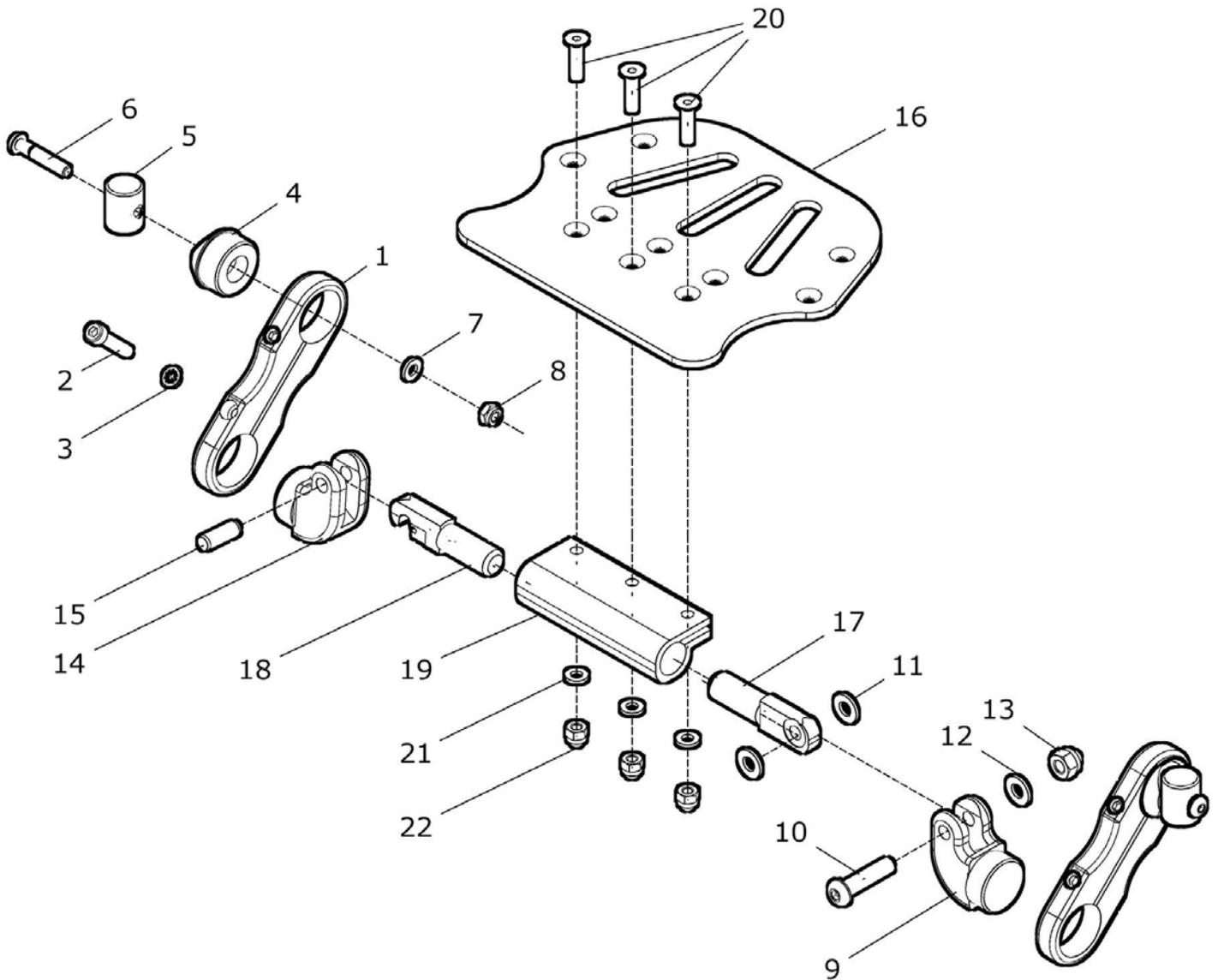

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	22 520 40	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert gerade kpl. Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 22	22 520 45	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert Abduktion kpl. Fußbrettplatte mit Drehgelenk und Haken und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a - 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 – 22	22 524 00	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen mit Gelenkbolzen kpl. mit Drehgelenk und Hacken und Gelenkbolzen rechts und links SB: ? FM: ?	1 St.
9 - 13	22 561 20	Gelenkbolzen mit Linsenkopfschraube	1 St.
9	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
10	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
11	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
12	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.

13	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
14 - 15	22 561 10	Gelenkbolzen mit Zylinderstift	1 St.
14	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
15	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
16 – 22	22 524 10	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert mit Drehgelenk und Hacken (ohne Gelenkbolzen) kpl. SB: ? FM: ?	1 St.
16a	72 511 01	Fußbrettplatte 160mm durchgehend Rahmen gerade: SB 26 – 28cm Abduktionsrahmen: SB 24cm FM.: ?	1 St.
16b	85 511 05	Fußbrettplatte 200mm durchgehend Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 26 – 28cm FM.: ?	1 St.
16c	85 511 01	Fußbrettplatte 240mm durchgehend Rahmen gerade: SB 34 – 36cm Abduktionsrahmen: SB 30 – 32cm FM.: ?	1 St.
16d	85 511 08	Fußbrettplatte 280mm durchgehend Rahmen gerade: SB 38 – 40cm Abduktionsrahmen: SB 34 – 36cm FM.: ?	1 St.
17	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.
18	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
19	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
20	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
22	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert und abschwenkbar (mit FB-Bügel und Klemmlaschen und Abschwenkmechanismus)

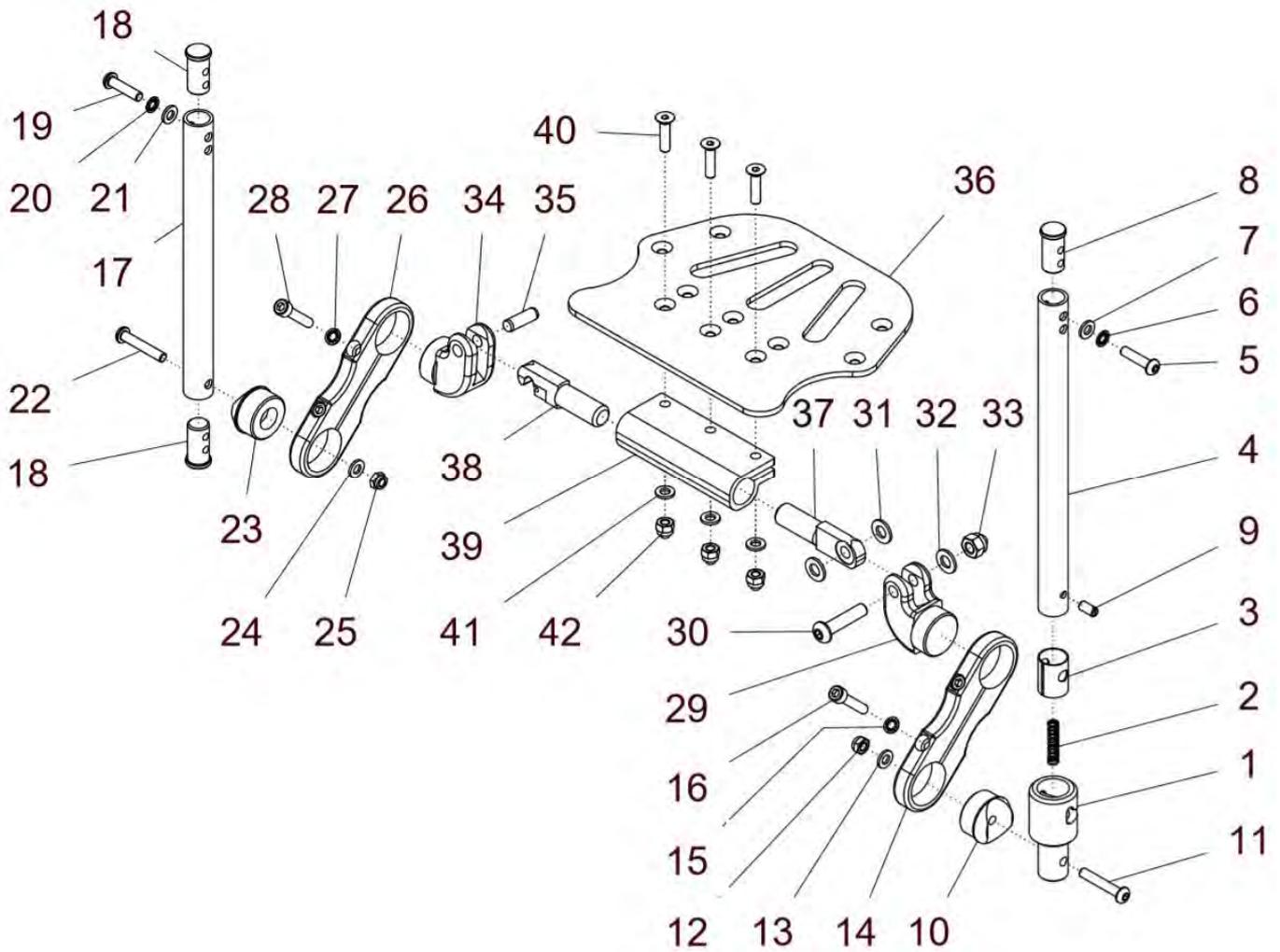


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 42	25 540 30	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen abschwenkbar kpl. Fußbrett-Flach-Profil mit Gelenkbolzen und Aufnahmebolzen, mit FB-Bügel gerade mit Abschwenkmechanismus und mit Klemmlaschen 85mm im Rahmen montiert SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
1 - 16	25 544 03	FB-Bügel links mit Führungsbolzen abschw. U. Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen für FB abschwenkbar und Aufnahmebolzen Ø18,7 mit Klemmlasche 85mm	1 St.
1 - 13	25 544 30	FB-Bügel gerade links mit Führungsbolzen abschwenkbar kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
1	25 544 21	Führungsbolzen für Fußbrett im Rahmen abschwenkbar	1 St.
2	02 110 04	Druckfeder	1 St.
3	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
4	40 524 61	Fußbrettbügel kurz gerade für FB abschwenkbar	1 St.
5	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
6	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
9	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 - DIN 427 A2	1 St.
10	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
11	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
12	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
13	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
14	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
15	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
16	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
17 - 28	25 544 10	FB-Bügel rechts mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade rechts Aufnahmebolzen Ø18,7 und mit Klemmlasche 85mm	1 St.
17 - 25	25 544 20	FB-Bügel gerade rechts mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. für Fußbrett abgesetzt und abschwenkbar (ohne Klemmlasche)	1 St.
17	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	1 St.
18	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
19	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
20	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.

21	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
22	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	1 St.
23	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	1 St.
24	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
25	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	1 St.
26	22 521 02	Klemmlasche 85mm	1 St.
27	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
28	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	2 St.
29 – 42	22 524 00	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen mit Gelenkbolzen kpl. mit Drehgelenk und Hacken und Gelenkbolzen rechts und links SB: ? FM: ?	1 St.
29 - 33	22 561 20	Gelenkbolzen mit Linsenkopfschraube	1 St.
29	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
30	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	1 St.
31	01 325 03	Scheibe 8,4 MS - DIN 125	2 St.
32	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125	1 St.
33	01 210 74	Hut-Mutter M8 schwarz – DIN 986	1 St.
34 - 35	22 561 10	Gelenkbolzen mit Zylinderstift	1 St.
34	22 561 01	Gelenkbolzen für FB-Platte im Rahmen montiert	1 St.
35	45 511 04	Bolzen gerändelt Ø8x24	1 St.
36 – 42	22 524 10	Fußbrettplatte durchgehend im Rahmen montiert kpl. mit Drehgelenk und Hacken (ohne Gelenkbolzen) SB: ? FM: ?	1 St.
36a	72 511 01	Fußbrettplatte 160mm durchgehend Rahmen gerade: SB 26 – 28cm Abduktionsrahmen: SB 24cm FM.: ?	1 St.
36b	85 511 05	Fußbrettplatte 200mm durchgehend Rahmen gerade: SB 30 – 32cm Abduktionsrahmen: SB 26 – 28cm FM.: ?	1 St.
36c	85 511 01	Fußbrettplatte 240mm durchgehend Rahmen gerade: SB 34 – 36cm Abduktionsrahmen: SB 30 – 32cm FM.: ?	1 St.
36d	85 511 08	Fußbrettplatte 280mm durchgehend Rahmen gerade: SB 38 – 40cm Abduktionsrahmen: SB 34 – 36cm FM.: ?	1 St.
37	45 513 11	Querrohr mit Drehgelenk SB: ?	1 St.

LITTLE AR / SLT


38	45 512 11	Querrohr mit Haken SB: ?	1 St.
39	70 521 02	Auflagerblock für FB durchgehend	1 St.
40	01 120 13	Senkschraube M6x25 - DIN 7991	3 St.
41	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	3 St.
42	01 210 83	Hut-Mutter M6 - DIN 986	3 St.

Fußbretthalter (Sprint-Verriegelung)

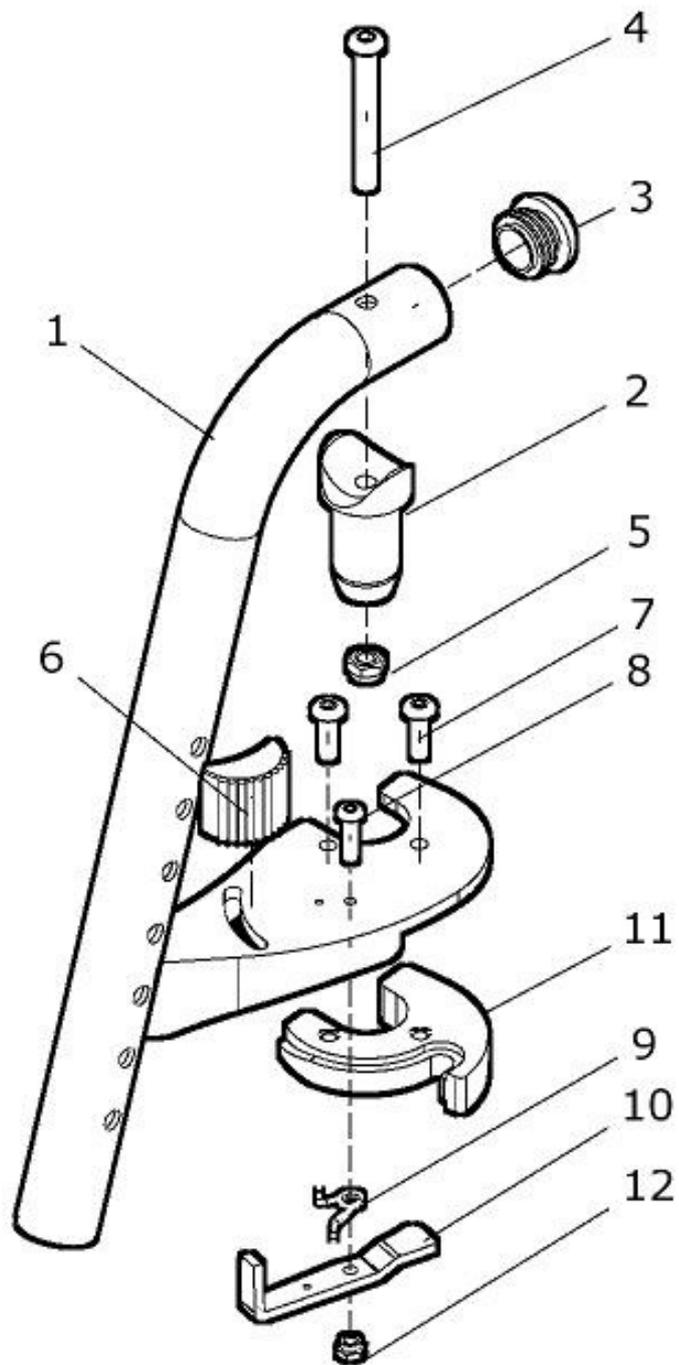

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 9a, 10a - 12	50 512 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts mit Verriegelung und Lagerbolzen kpl. FM: ?	1 St.
1b – 9b, 10b - 12	50 513 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links mit Verriegelung und Lagerbolzen kpl. FM: ?	1 St.
1a	50 512 01	Fußbretthalter rechts FM: ?	1 St.
1b	50 513 01	Fußbretthalter links FM: ?	1 St.
2	50 511 10	Lagerbolzen Kunststoff	2 St.
3	04 210 02	Verschlussstopfen Ø23	2 St.
4	01 153 26	Linsenschraube M6x40 - ISO 7380	2 St.
5	01 210 03	Sechskantmutter M6 -DIN 985	2 St.
6 – 9a, 10a - 12	50 512 20	Verriegelung rechts kpl.	1 St.
6 – 9b, 10b - 12	50 513 20	Verriegelung links kpl.	1 St.
6	04 205 01	Verriegelungskappe	2 St.
7	01 152 03	Linsenschraube M5x16 - ISO 7380	4 St.
8	01 152 00	Linsenschraube M4x16 - ISO 7380	2 St.
9a	02 310 01	Schenkelfeder rechts	1 St.
9b	02 310 02	Schenkelfeder links	1 St.
10a	50 512 02	Hebel für Verriegelung rechts	1 St.
10b	50 513 02	Hebel für Verriegelung links	1 St.
11	50 511 01	Verriegelung	2 St.
12	01 210 01	Sechskantmutter M4 - DIN 985	2 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil)

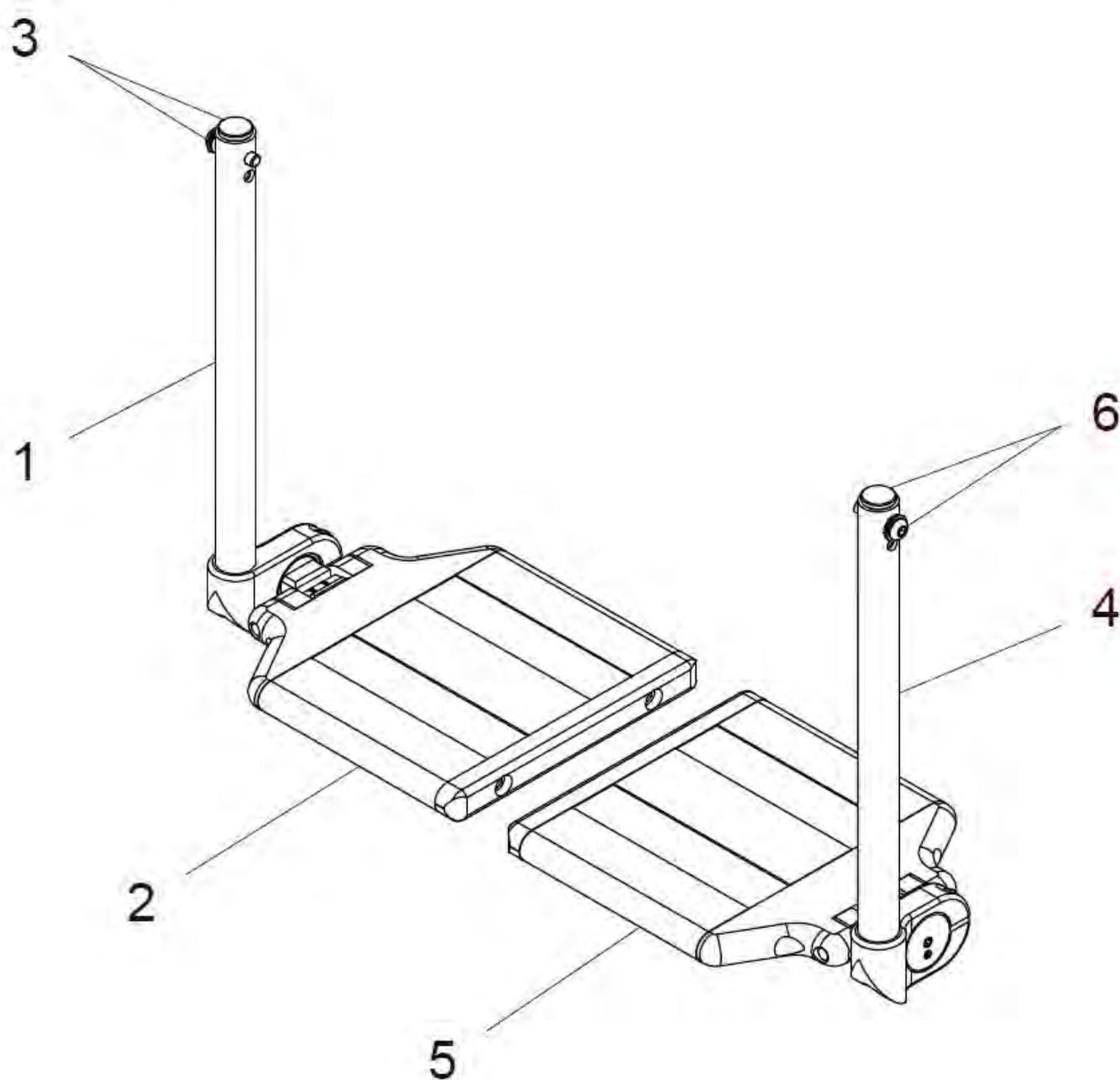

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	24 540 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel / Ra. gerade kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel (Rahmenform gerade) FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 6	24 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel (Rahmenform Abduktion) FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 3	24 542 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	45 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
3	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
4 – 6	24 543 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (links) kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
4a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
4b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
4c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
4d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.

LITTLE AR / SLT


5	45 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
6	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set

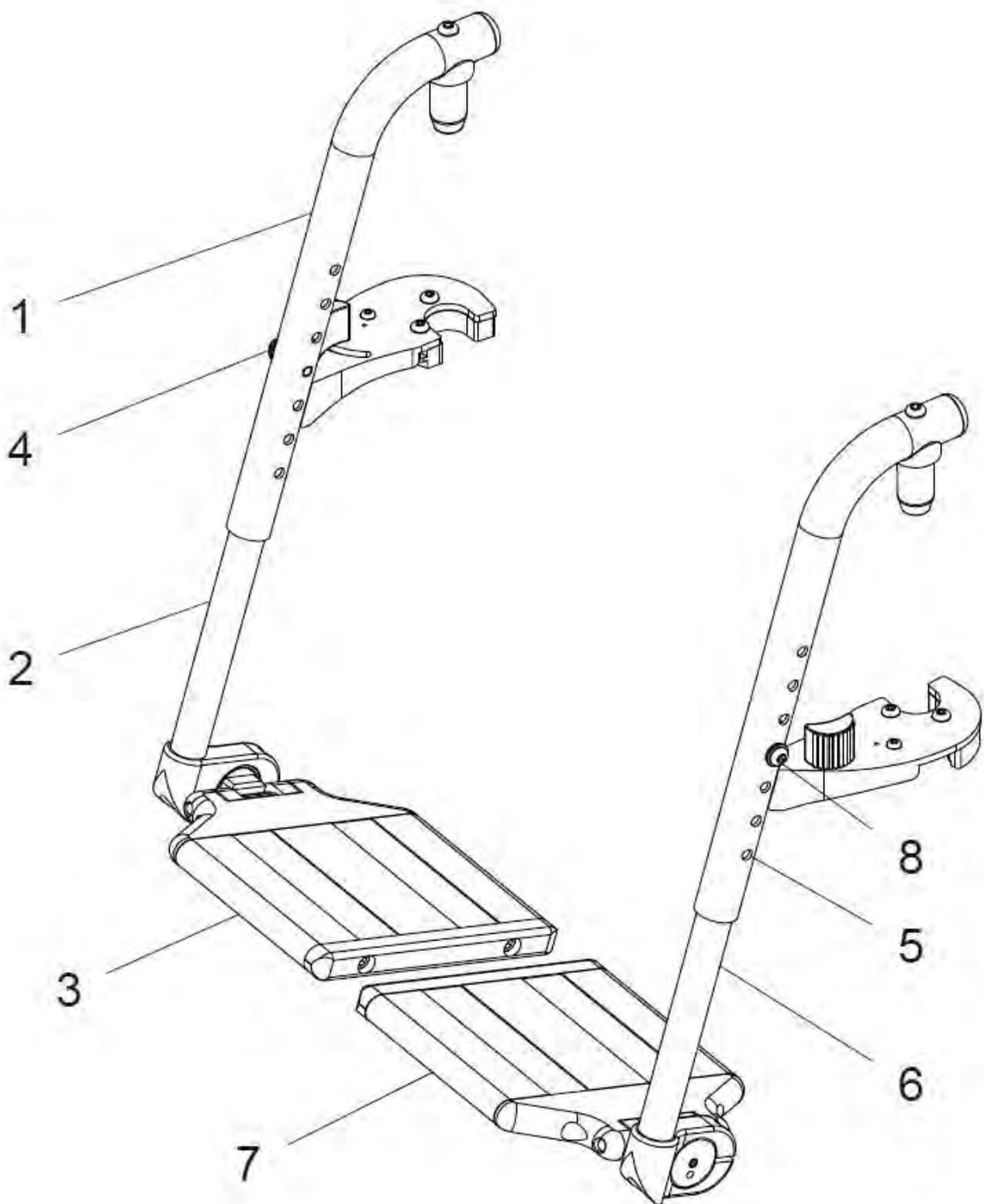Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit FB-Halter (Sprint-Verriegelung)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	24 540 70	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Halter (Paar) kpl. Fußbretthalter rechts und links mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil farbig FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 4	24 540 72	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Halter (rechts) kpl. Fußbretthalter rechts mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil farbig FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1	50 512 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) rechts kpl. mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	1 St.
2 – 4	24 542 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
2a	50 524 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
2b	50 524 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
2c	50 524 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
2d	50 524 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme rechts kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
3	45 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
4	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
5 – 8	24 540 73	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Halter (links) kpl. Fußbretthalter links mit Fußbrettbügel und Fußbrett-Profil farbig FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.

5	50 513 00	Fußbretthalter (SPRINT-Verriegelung) links mit Verriegelung und Lagerbolzen FM: ?	kpl.	1 St.
6 – 8	24 543 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (links) Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	kpl.	1 St.
6a	50 525 50	Fußbrettbügel gerade lang mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	kpl.	1 St.
6b	50 525 52	Fußbrettbügel gerade kurz mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	kpl.	1 St.
6c	50 525 48	Fußbrettbügel gebogen lang mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	kpl.	1 St.
6d	50 525 40	Fußbrettbügel gebogen kurz mit Klemmaufnahme links mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	kpl.	1 St.
7	45 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	(links) kpl.	1 St.
8	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	kpl.	2 Set

Fußbrett (Alu-Profil) geteilt

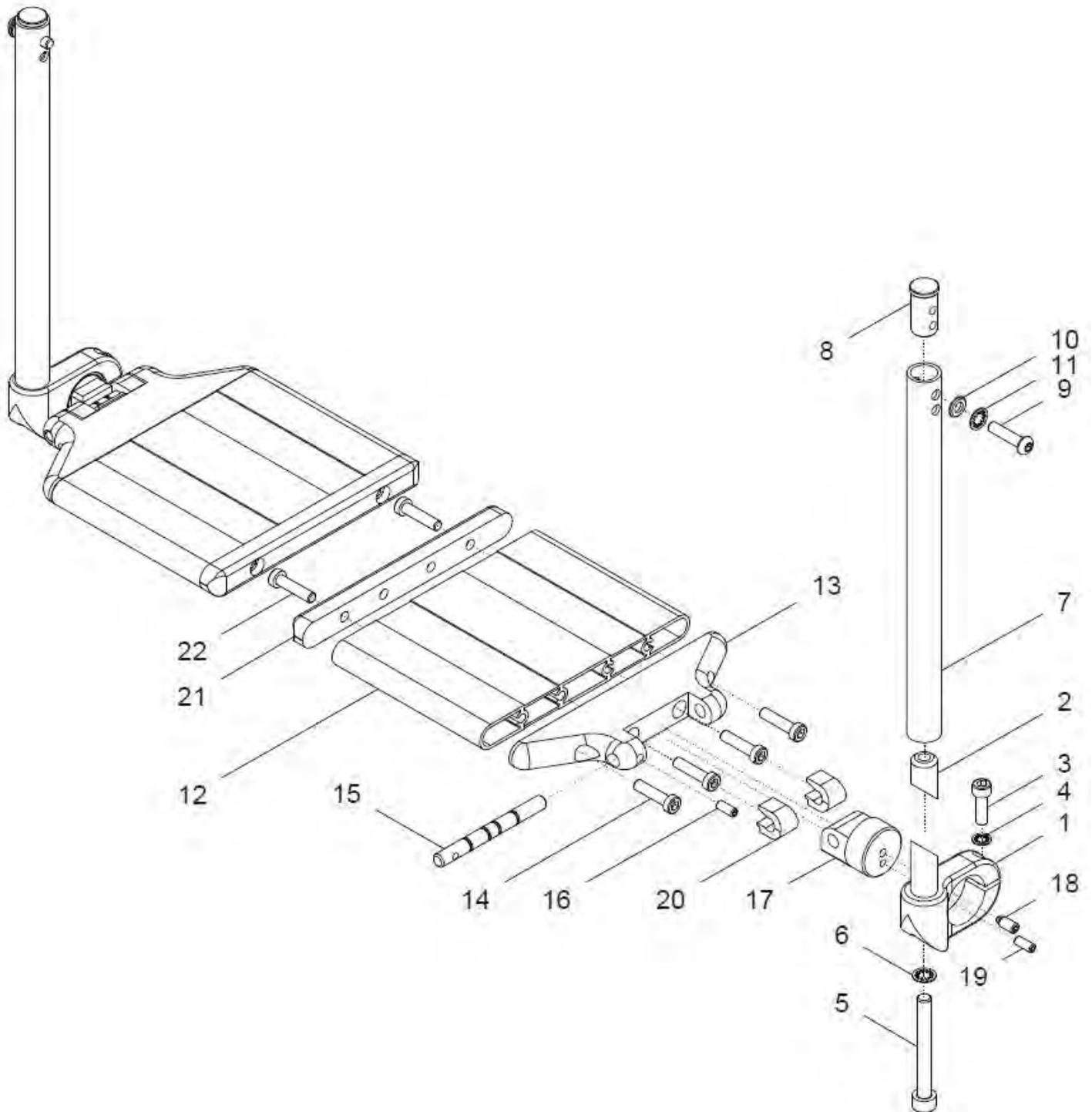


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	24 540 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel / Ra. gerade kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel (Rahmenform gerade) FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 22	24 540 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel / Abduktion kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel (Rahmenform Abduktion) FM: ? SB: ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1 – 22	24 542 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (rechts) kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1 – 22	24 543 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel (links) kpl. Fußbrett-Profil farbig mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b – 6 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b – 6 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b – 6 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b – 6 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a – 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b – 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.

1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.
4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12 - 22	45 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12 - 22	45 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 541 11	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Rahmen gerade SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	2 St.
12b	45 541 16	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Abduktionsrahmen SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.

LITTLE AR / SLT

19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.


Fußbrett geteilt (Alu-Profil) mit Spastikerverriegelung

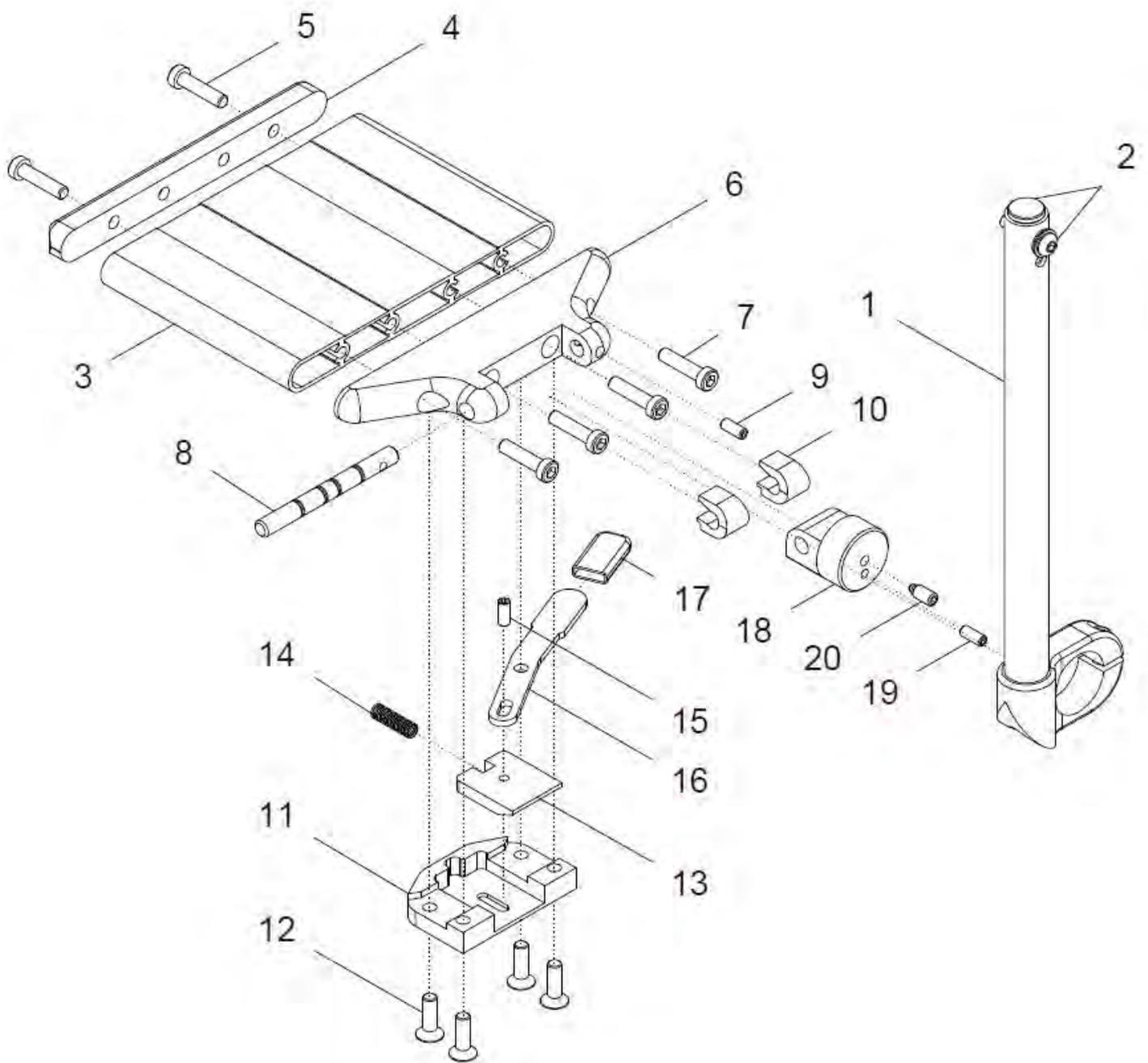

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	24 540 05	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil farbig rechts und links mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1e – 20	24 542 05	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig rechts mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil farbig rechts mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 20	24 543 05	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig links mit Spastikerver. kpl. Fußbrett-Profil farbig links mit Spastikerverriegelung, mit Gelenkbolzen und mit Fußbrettbügel FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1e	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1f	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1g	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1h	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
2	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
3 – 20	24 542 25	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig rechts mit Spastikerver. kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.

3 – 20	24 543 25	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) links mit Spastikerverriegelung kpl. (ohne Fußbrettbügel / ohne Fußbretthalter) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
3a	45 541 11	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	2 St.
3b	45 541 16	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	2 St.
4	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
5	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
6 – 20	40 551 20	Spastikerverriegelung FB geteilt rechts kpl. (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	1 St.
6 – 20	40 551 30	Spastikerverriegelung FB geteilt links kpl. (mit Endstück FB-Profil mit Drehachse und Gelenkbolzen)	1 St.
6	40 551 06	Endstück Fußbrettprofil für Spastikerverriegelung	2 St.
7	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
8	40 521 23	Drehachse	2 St.
9	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
10	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
11 – 17	40 551 10	Spastikerverriegelung Gehäuse kpl. Gehäuse Spastikerverriegelung mit Riegel, Druckfeder, Hebel, Kappe und Schrauben	2 St.
11	40 551 01	Gehäuse für Spastikerverriegelung	2 St.
12	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991	8 St.
13	40 551 02	Riegel für Spastikerverriegelung	2 St.
14	02 110 05	Druckfeder	2 St.
15	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
16	40 551 03	Hebel für Spastikerverriegelung	2 St.
17	04 210 82	Flachkappe rot	2 St.
18	40 551 04	Gelenkbolzen FB-Profil geteilt für Spastikerverriegelung	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 POM	2 St.


Fußbrett geteilt und FB-Bügel mit Abschwenkmechanismus

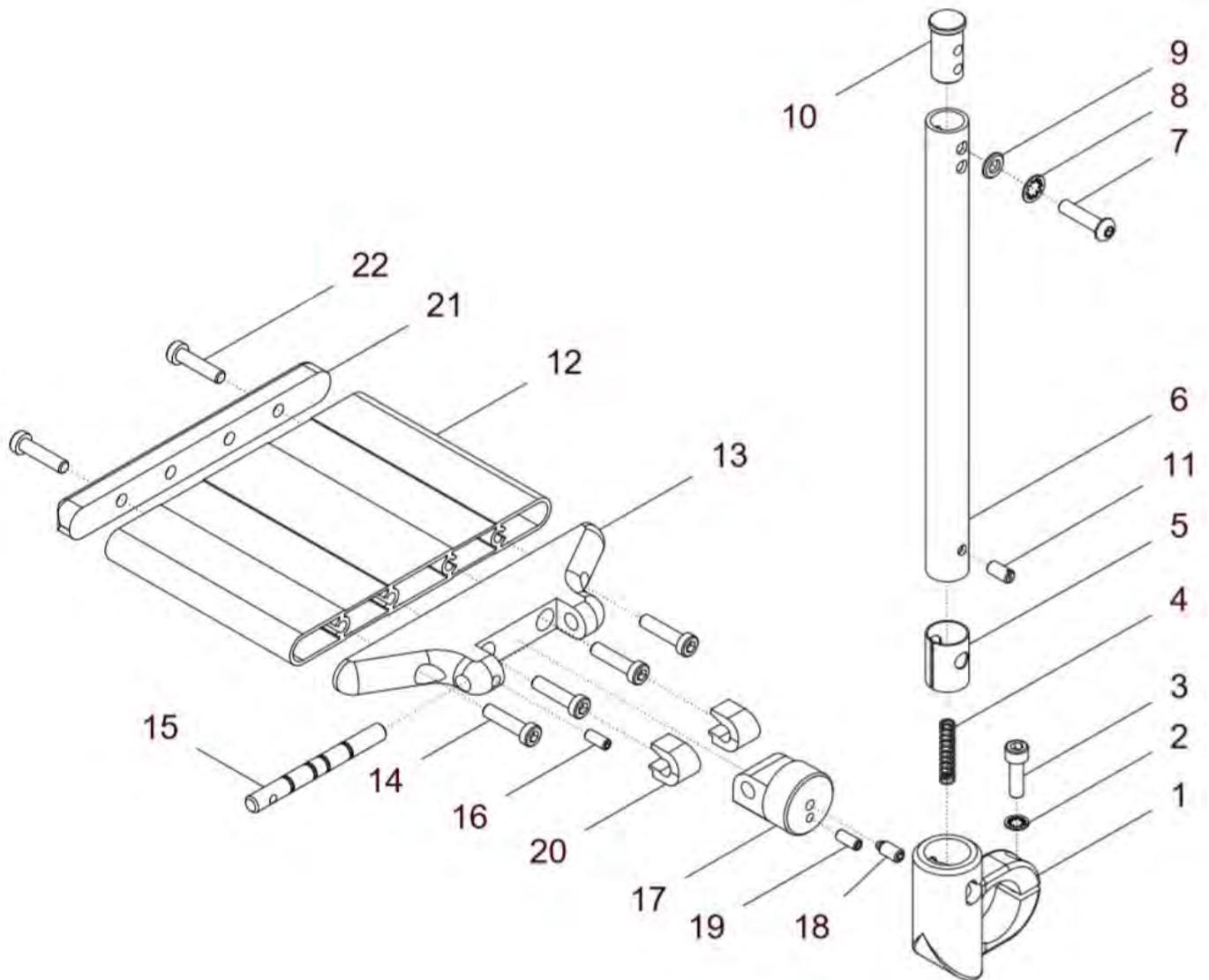

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	24 540 40	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel abschw. Pa. kpl. Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig mit FB-Bügel links und rechts Und mit Abschwenkmechanismus rechts und links FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / gerade ?	1 Paar
1a – 11	40 526 60	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1a – 11	40 526 30	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme links kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme links FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1b – 11	40 526 70	FB-Bügel gerade mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gerade: lang (240) / kurz (175) ?	1 St.
1b – 11	40 526 20	FB-Bügel gebogen mit Abschwenk-Klemmaufnahme rechts kpl. abschwenkbare Seite / Klemmaufnahme rechts FB-Bügel gebogen: lang (320) / kurz (240) ?	1 St.
1a	40 526 31	Klemmaufnahme links für FB abschwenkbar (links)	1 St.
1b	40 526 21	Klemmaufnahme rechts für FB abschwenkbar (rechts)	1 St.
2	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	1 St.
4	02 110 04	Druckfeder	1 St.
5	40 524 01	Buchse für Abschwenkmechanismus	1 St.
6a	40 526 11	Fußbrettbügel gerade lang (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6b	40 524 61	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6c	40 524 11	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
6d	40 524 13	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm) f. FB abschwenkbar	1 St.
7 - 10	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	1 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	1 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	1 St.
10	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	1 St.
11	01 138 10A	Schaftschraube M6x12 – DIN 427 A2	1 St.


12 – 22	45 542 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (rechts) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12 – 22	45 543 00	Fußbrett geteilt (Profil) farbig mit Gelenkbolzen (links) kpl. FM: ? SB: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 541 11	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Rahmen gerade SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade	2 St.
12b	45 541 16	Fußbrett (Profil) geteilt farbig für Rahmen mit Abduktion SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
13	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
14	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	8 St.
15	40 521 23	Drehachse	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
21	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.
22	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	4 St.

Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil)

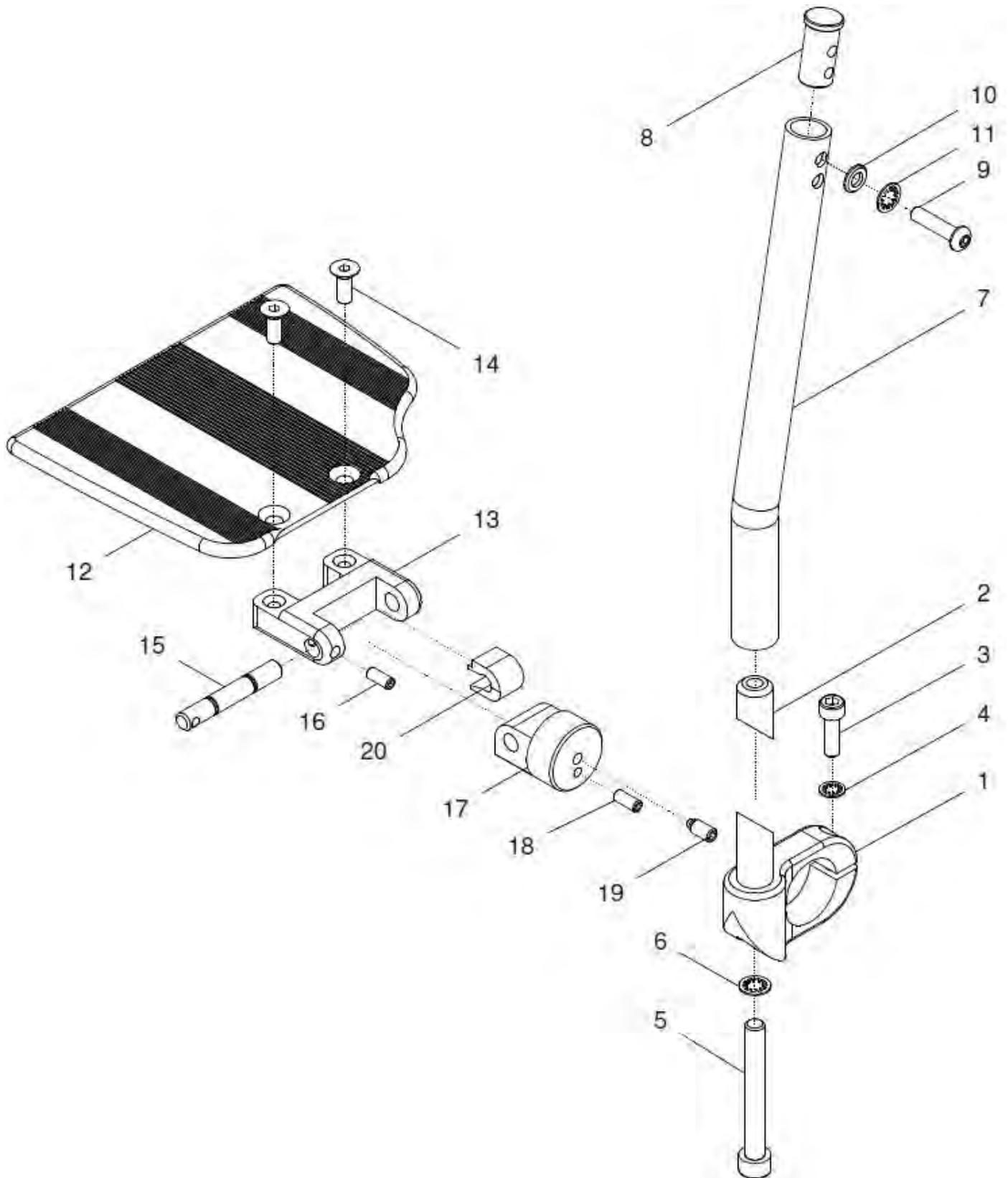

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	24 550 00	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig mit FB-Bügel Pa. kpl. Fußbrett flach geteilt farbig mit Fußbrettbügel links und rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 Paar
1a – 20	24 552 00	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig mit FB-Bügel links kpl. Fußbrett flach geteilt farbig mit Fußbrettbügel links SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1b – 20	24 553 00	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig mit FB-Bügel rechts kpl. Fußbrett flach geteilt farbig mit Fußbrettbügel rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ? Fußbrettbügel: gerade / gebogen bzw. kurz / lang ?	1 St.
1a – 6, 7a	50 525 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1a – 6, 7b	50 525 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1a – 6, 7c	50 525 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1a – 6, 7d	50 525 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>links</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1b – 6, 7a	50 524 50	Fußbrettbügel <u>gerade</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	1 St.
1b – 6, 7b	50 524 52	Fußbrettbügel <u>gerade</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	1 St.
1b – 6, 7c	50 524 48	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> lang mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	1 St.
1b – 6, 7d	50 524 40	Fußbrettbügel <u>gebogen</u> kurz mit Klemmaufnahme <u>rechts</u> kpl. mit Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	1 St.
1a - 6	50 525 45	Klemmaufnahme <u>links</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1b - 6	50 524 45	Klemmaufnahme <u>rechts</u> mit Bolzen kpl. (ohne Fußbrettbügel)	1 St.
1a	50 525 41	Klemmaufnahme links mit Bolzen	1 St.
1b	50 524 41	Klemmaufnahme rechts mit Bolzen	1 St.
2	50 524 42	Klemmteil für Klemmaufnahme	2 St.
3	01 160 22	Zylinderkopfschraube M6x20 - DIN 912	2 St.


4	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
5	01 160 85	Zylinderkopfschraube M8x65 - DIN 912	2 St.
6	01 330 02	Schnorr-Sicherungsscheibe NM8	2 St.
7a	50 521 41	Fußbrettbügel gerade lang (240mm)	2 St.
7b	22 515 11	Fußbrettbügel gerade kurz (175mm)	2 St.
7c	50 521 46	Fußbrettbügel gebogen lang (320mm)	2 St.
7d	50 521 45	Fußbrettbügel gebogen kurz (240mm)	2 St.
8 - 11	50 521 00	Bolzen für Fußbrettbügel kpl. Bolzen mit Linsenkopfschraube M6x25 mit Schnorrscheibe NM6 und U-Scheibe 6,4	2 Set
8	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	2 St.
9	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
10	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
11	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
12a - 20	45 562 20	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig rechts kpl. mit Gelenkbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12b - 20	45 563 20	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig links kpl. mit Gelenkbolzen (ohne FB-Bügel) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12a	45 562 30	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
12b	45 563 30	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig links SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13	45 561 21	Aufnahme für Fußbrettflachprofil	2 St.
14	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
15	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
18	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
20	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.

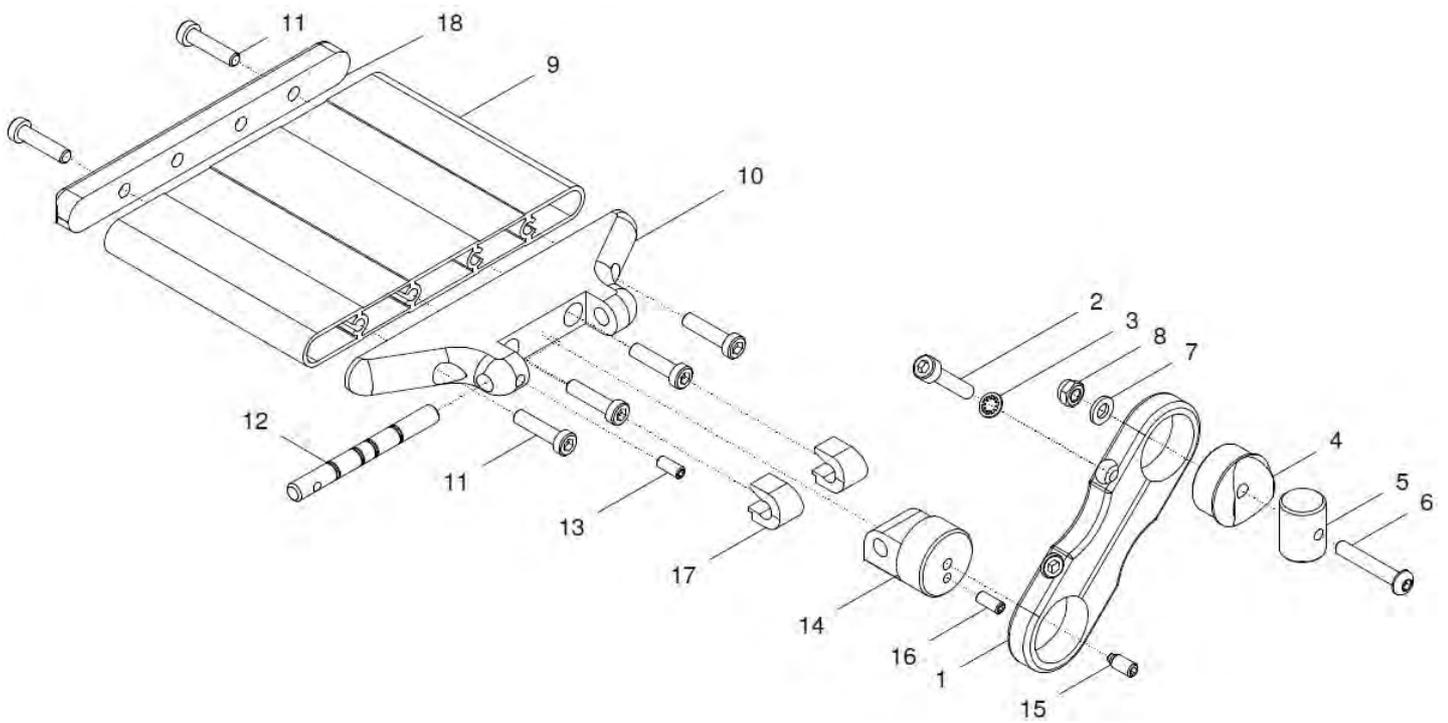Fußbrett (Alu-Profil) geteilt im Rahmen montiert

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 18	24 545 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig im Rahmen gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 18	24 545 02	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig rechts im Rahmen / gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> für rechte Seite FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	24 545 03	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig links im Rahmen / gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> für linke Seite FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	24 545 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig im Rahmen Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 18	24 545 22	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig rechts im Rahmen / Abdu. kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> für rechte Seite FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1 – 18	24 545 23	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig links im Rahmen / Abdu. kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> für linke Seite FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 St.
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.


2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9 - 18	24 546 20	Fußbrett geteilt (Profil) farbig im Rahmen rechts kpl. mit Gelenkbolzen und Endstück SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9 - 18	24 546 30	Fußbrett geteilt (Profil) farbig im Rahmen links kpl. mit Gelenkbolzen und Endstück SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9a	24 546 11	Fußbrett (Profil) geteilt farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB .. SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	2 St.
9b	24 546 16	Fußbrett (Profil) geteilt farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
10 - 18	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	2 St.
10	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
11	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	12 St.
12	40 521 23	Drehachse	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
15	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
16	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
18	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.

Fußbrett (Alu-Profil) geteilt abgesetzt (mit FB-Bügel und Klemmlaschen)

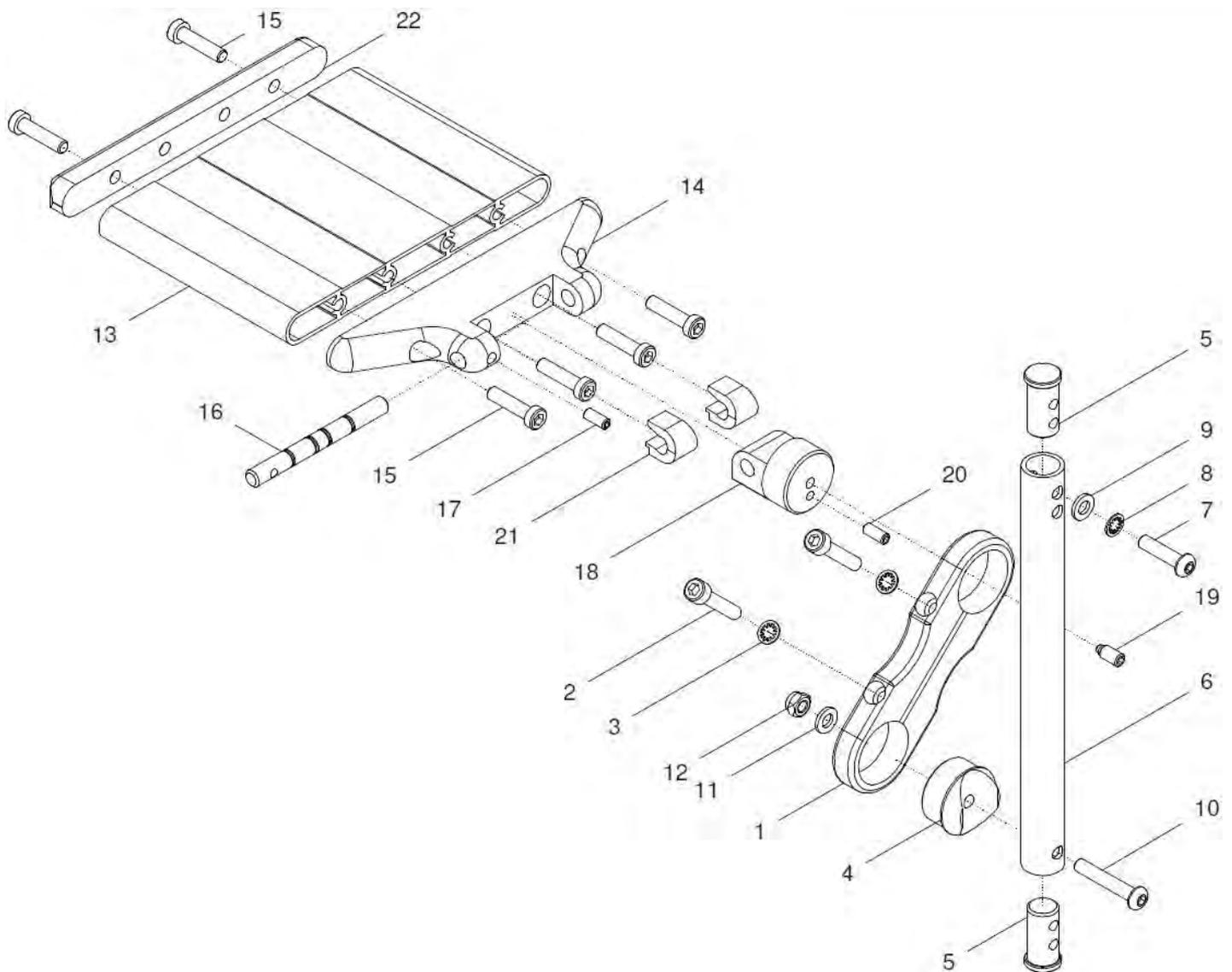


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	24 565 00	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig abgesetzt, gerade kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen 85mm, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ?	1 Paar
1 – 22	24 565 20	Fußbrett geteilt (Alu-Profil) farbig abgesetzt, Abduktion kpl. Fußbrett-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen 85mm, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ?	1 Paar
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13 – 22	24 546 20	Fußbrett geteilt (Profil) farbig im Rahmen rechts kpl. mit Gelenkbolzen und Endstück SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13 – 22	24 546 30	Fußbrett geteilt (Profil) farbig im Rahmen links kpl. mit Gelenkbolzen und Endstück SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.

13a	24 546 11	Fußbrett (Profil) geteilt farbig im Rahmen / Rahmen gerade SB .. SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade (im Rahmen montiert)	2 St.
13b	24 546 16	Fußbrett (Profil) geteilt farbig im Rahmen / Abduktionsrahmen SB ... SB: ? FM: ? Rahmenform: Abduktion (im Rahmen montiert)	2 St.
o. Bild	40 521 26	Antirutschbelag 25mm breit (Meterware)	1 m
14 – 22	40 521 50	Endstück-Fußbrett mit Gelenkbolzen und Drehachse kpl. (ohne Fußbrettprofil)	2 St.
14	40 521 24	Endstück Fußbrettprofil	2 St.
15	01 170 05	Zylinderschraube (selbstschneidend) M6x25 - DIN 7500	12 St.
16	40 521 23	Drehachse	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
19	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
20	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
21	40 521 25	Distanzstück mit Nase	4 St.
22	40 541 09	Abdeckplatte Fußbrett geteilt	2 St.

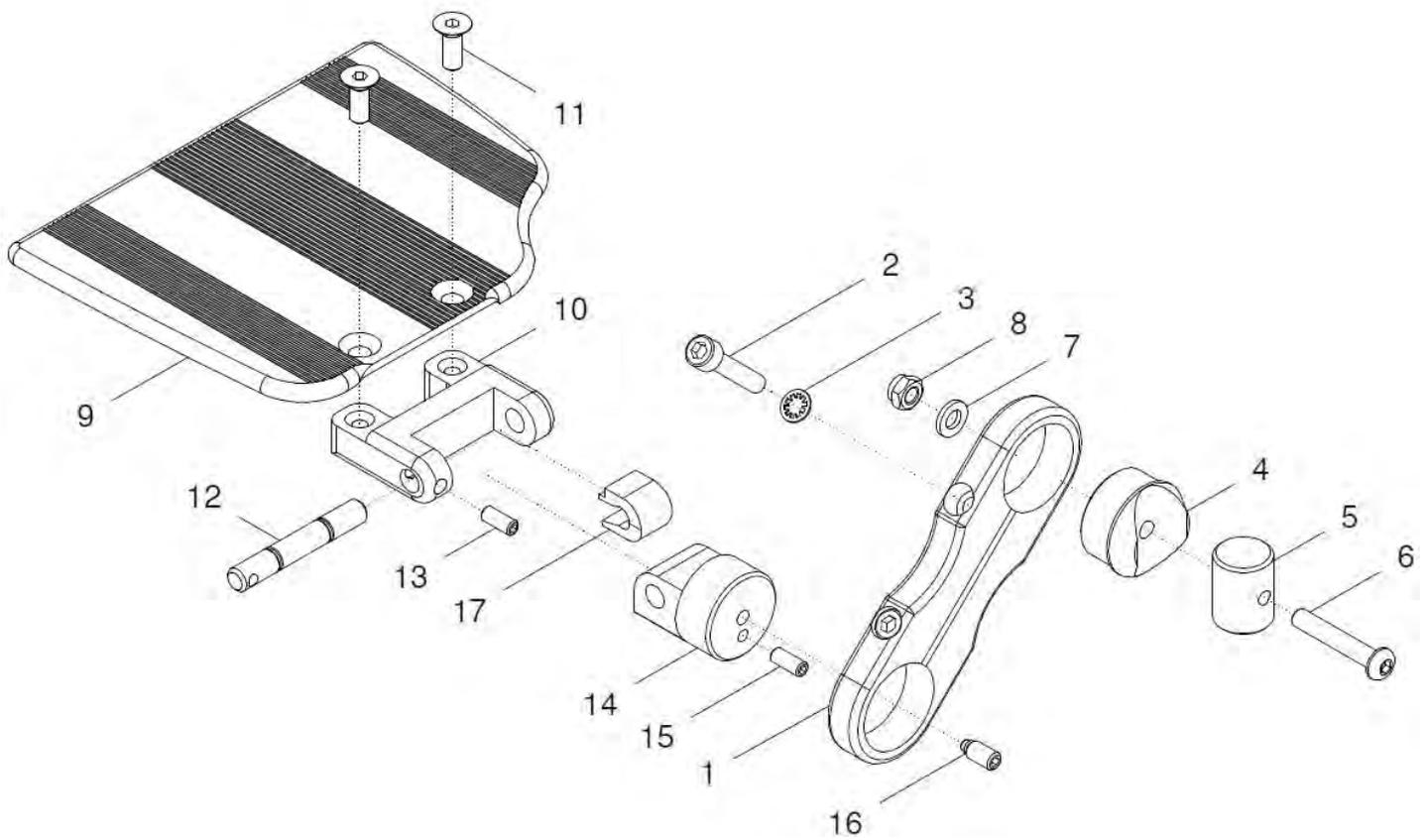Fußbrett flach geteilt im Rahmen montiert (Flach-Profil)

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	24 555 00	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen gerade kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1 – 17	24 555 20	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen Abduktion kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit Klemmlaschen im Rahmen montiert, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ? Klemmlasche: ? (60mm / 85mm / 145mm)	1 Paar
1a – 8	22 521 51	Klemmlasche 60mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 60mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1b - 8	22 521 52	Klemmlasche 85mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 85mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1c - 8	22 521 55	Klemmlasche 145mm im Rahmen montiert kpl. Klemmlasche 145mm mit Aufnahme- und Verstärkungsbolzen	2 St.
1a	22 521 01	Klemmlasche 60mm	2 St.
1b	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
1c	22 521 05	Klemmlasche 145mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 8	22 521 20	Aufnahmebolzen Ø23 mit Verstärkungsbolzen kpl. (ohne Klemmlasche)	2 Set
4	22 521 04	Aufnahmebolzen Ø23mm	2 St.
5	22 521 08	Verstärkungsbolzen	2 St.
6	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
8	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
9a – 17	24 556 20	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rah. rechts kpl. Fußbrett flach geteilt farbig rechts im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.


9b – 17	24 556 30	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rah. links kpl. Fußbrett flach geteilt farbig links im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9a	24 556 21	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
9b	24 556 31	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen links SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
10	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert	2 St.
11	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
12	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
13	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
14	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
15	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
16	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
17	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.

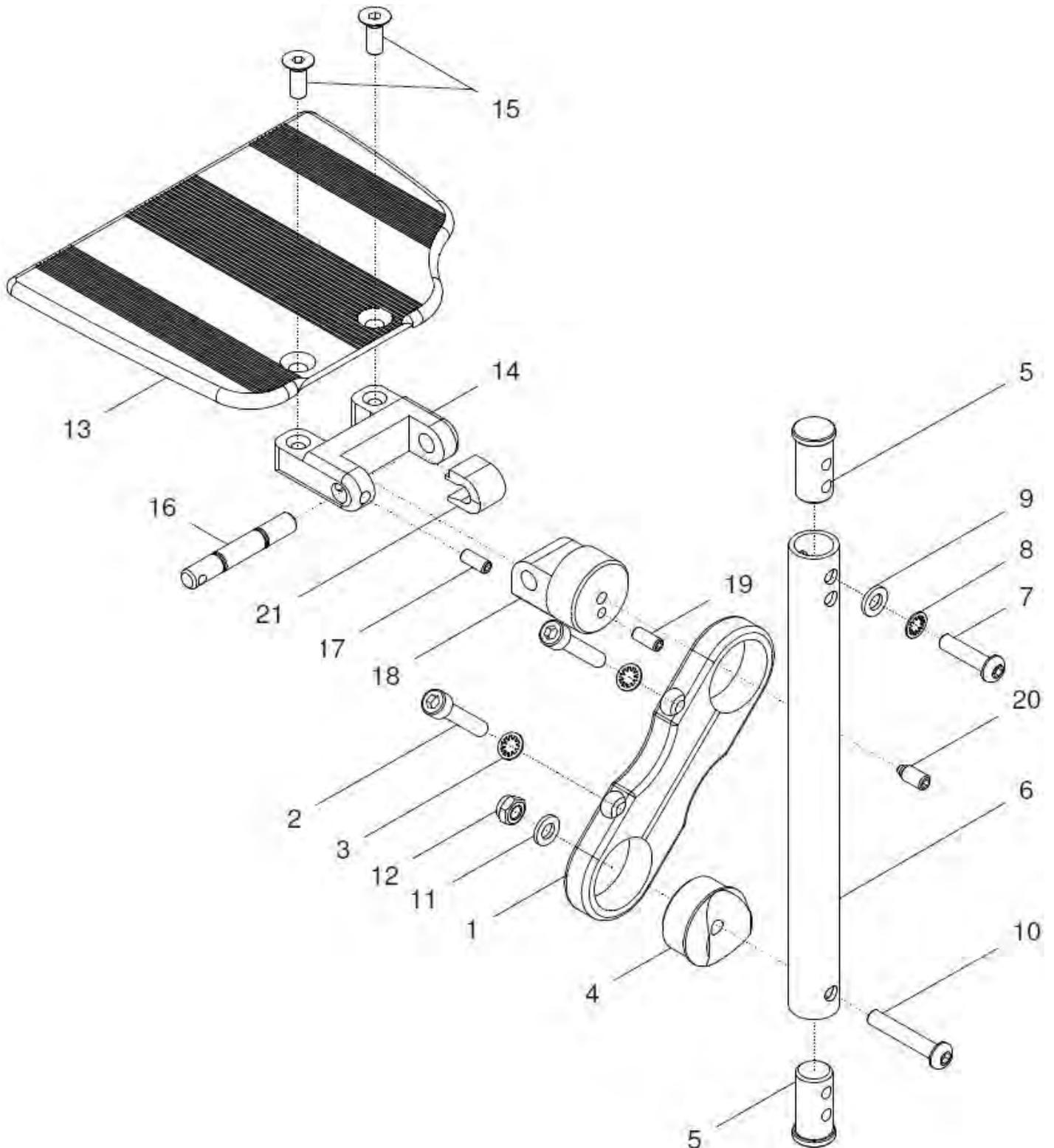**Fußbrett flach geteilt abgesetzt (Flach-Profil)
(mit FB-Bügel und Klemmlaschen)**

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	24 575 00	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) farbig abgesetzt gerade kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>gerade</u> FM: ? SB: ?	1 Paar
1 – 21	24 575 20	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) farbig abgesetzt Abduktion kpl. Fußbrett-Flach-Profil geteilt farbig mit Gelenkbolzen und mit FB-Bügel gerade und mit Klemmlaschen, für Rahmenform <u>Abduktion</u> FM: ? SB: ?	1 Paar
1 – 12	22 531 10	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen und Klemmlasche kpl. FB-Bügel gerade mit Klemmlasche 85mm	2 St.
1	22 521 02	Klemmlasche 85mm	2 St.
2	01 160 75	Zylinderkopfschraube M6x30 - DIN 912	4 St.
3	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	4 St.
4 - 12	22 531 20	FB-Bügel gerade mit Aufnahmebolzen Ø18,7 kpl. (ohne Klemmlasche)	2 St.
4	22 521 03	Aufnahmebolzen Ø18,7mm	2 St.
5	50 521 10	Bolzen für Fußbrettbügel	4 St.
6	U40 531 18	Fußbrettbügel gerade	2 St.
7	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380	2 St.
8	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6	2 St.
9	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
10	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380	2 St.
11	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.
13a – 21	24 556 20	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rah. rechts kpl. Fußbrett flach geteilt farbig rechts im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13b – 21	24 556 30	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rah. links kpl. Fußbrett flach geteilt farbig links im Rahmen mit Gelenkbolzen (ohne Klemmlasche) SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.

13a	24 556 21	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen rechts SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
13b	24 556 31	Fußbrett flach geteilt (Flach-Profil) farbig im Rahmen links SB: ? FM: ? Rahmenform: gerade / Abduktion ?	1 St.
14	45 561 25	Aufnahme für Fußbrettflachprofil im Rahmen montiert	2 St.
15	01 120 11	Senkschraube M6x16 - DIN 7991	4 St.
16	45 561 22	Achsbolzen	2 St.
17	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
18	40 521 21	Gelenkbolzen Fußbrettprofil	2 St.
19	01 131 42	Gewindestift M5x12 - DIN 913	2 St.
20	01 132 73	Druckschraube M6x13,3 - POM	2 St.
21	40 521 25	Distanzstück mit Nase	2 St.

Wadenband

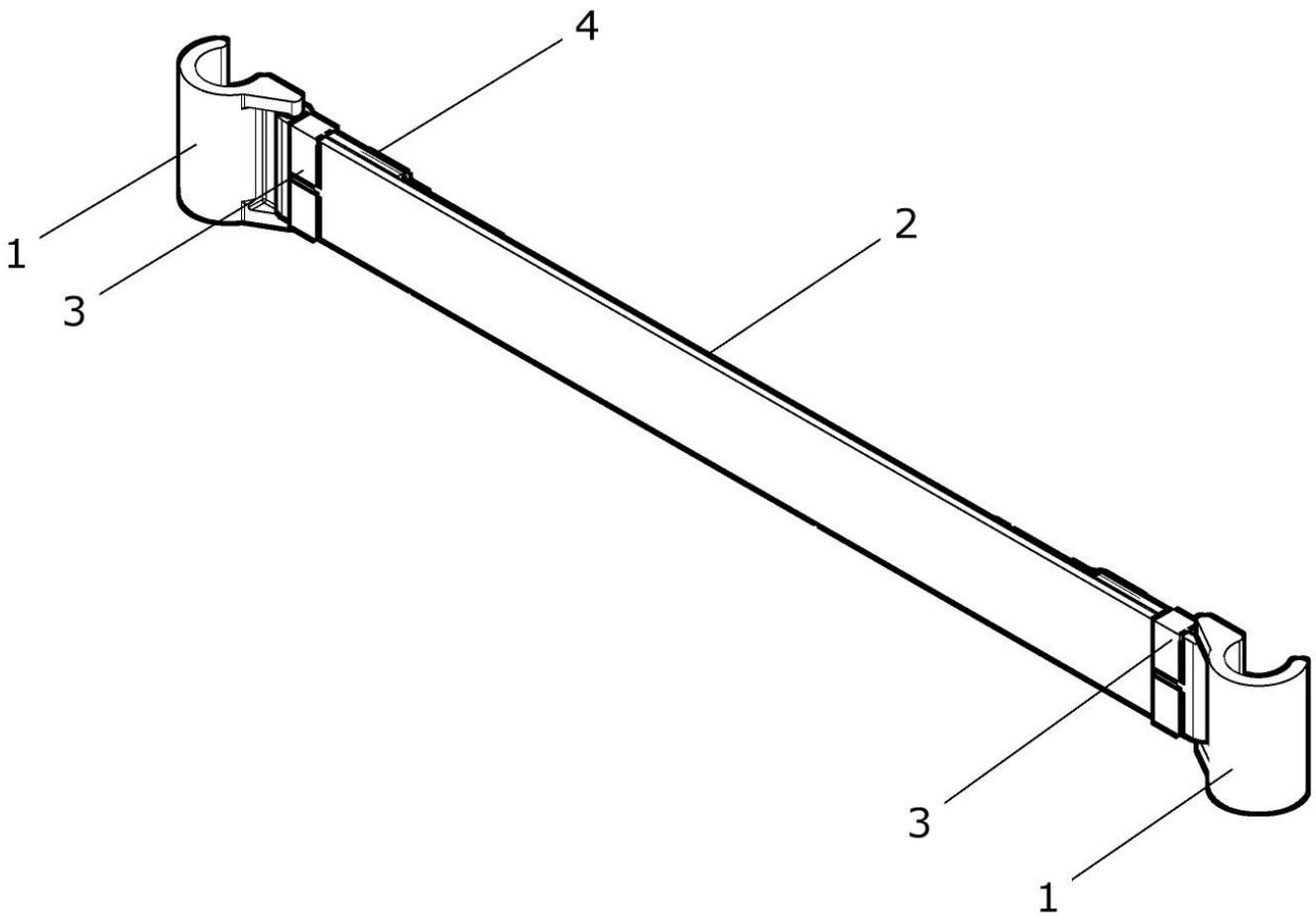


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	40 519 00	Wadenband mit Flausch und Y-Hook SB ... mit Wadenbandhalter und Gurtführung SB: ?	1 St.
1	50 519 01	Wadenbandhalter	2 St.
2	40 519 50	Wadenband (Flauschband) SB: ?	1 St.
3	04 220 03	Gurtführung	2 St.
4	04 220 61	Y-Hook	2 St.

Räder


Gruppe 6

Lochplatte standard (innen montiert)

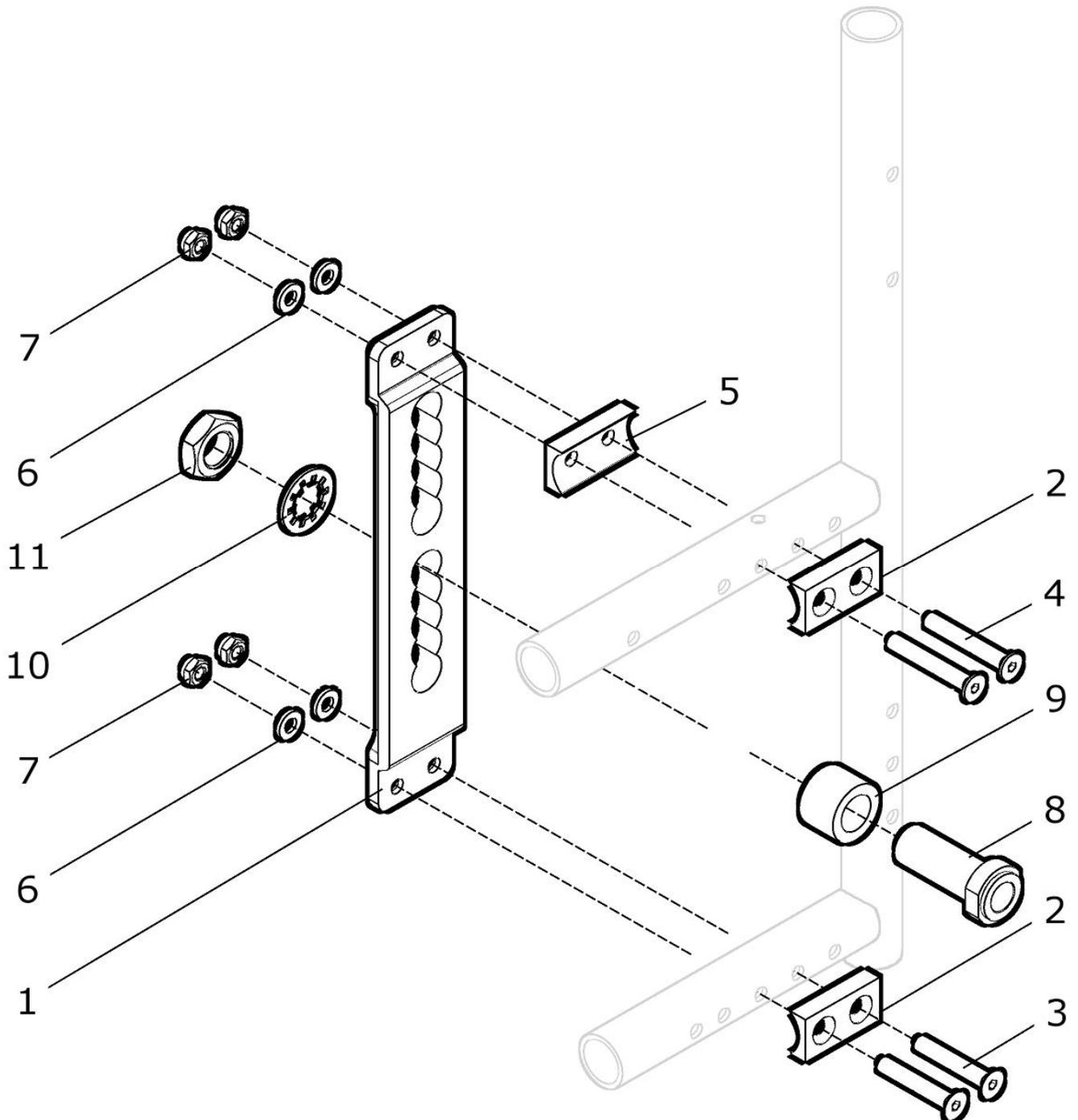

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 621 00	Lochplatte innen montiert Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 2°	kpl. 2 St.
1	50 621 01	Lochplatte standard	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	8 St.
8 – 11	50 622 40	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 18mm Buchse kpl.	2 St.
8	01 195 01	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 (1/2")	2 St.
9	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 05	Mutter M16x1	2 St.

Lochplatte standard (außen montiert)

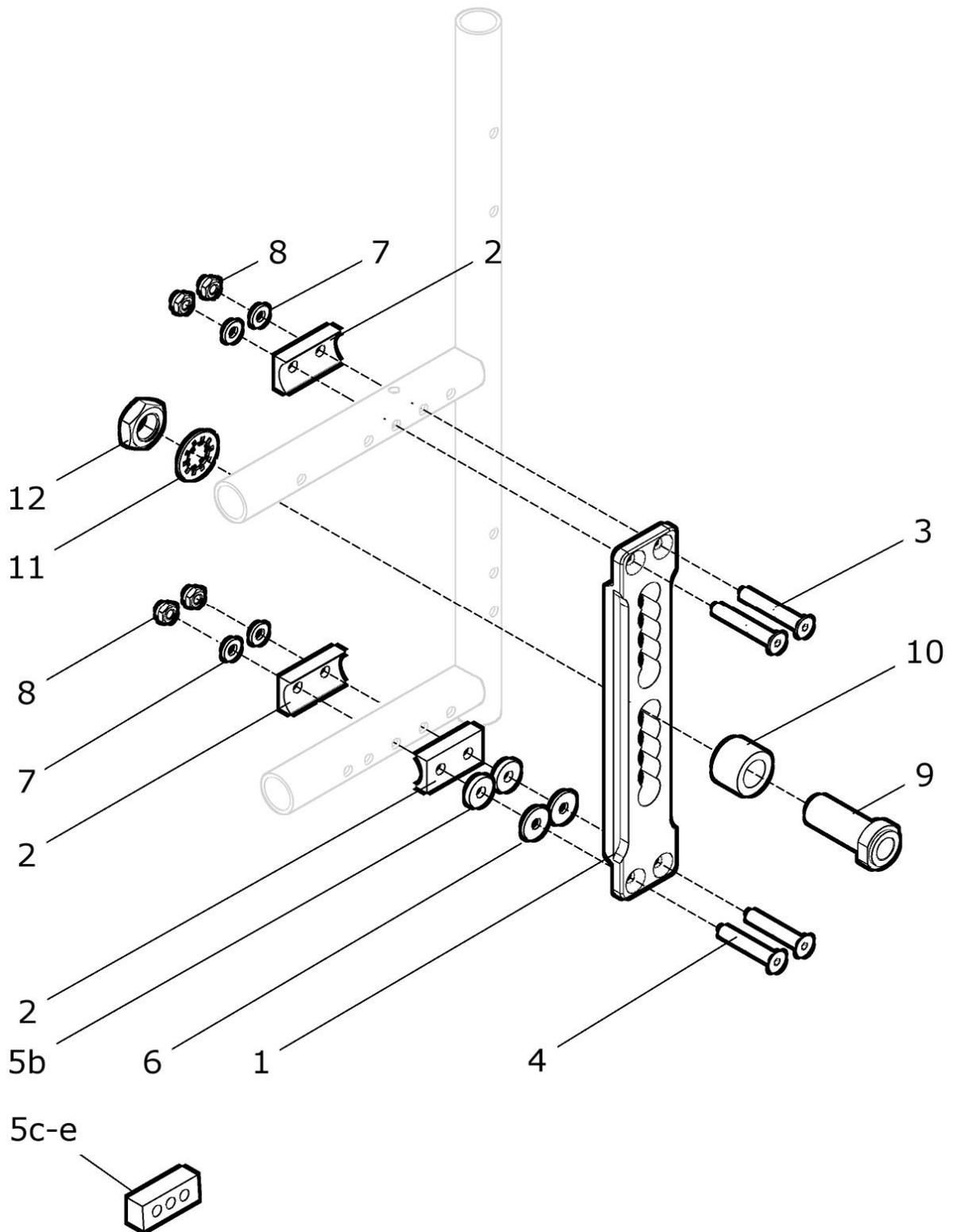


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1 – 8	50 621 10	Lochplatte außen montiert Lochplatte mit Halbschalen und Schrauben		2 St.
		kpl.		
		Sturz: ?		
1	50 621 01	Lochplatte standard		2 St.
2 – 4a, 7 - 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a - 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2 – 4e, 5d, 7, 8	50 621 99	Montageset	Sturz 10°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 18	Senkschraube M6x50 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
4e	01 120 24	Senkschraube M6x80 - DIN 7991	Sturz 10°	4 St.
zu 5	-----	ohne Scheibe	Sturz 0°	-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
5d	50 621 08	Distanzblock 33mm	Sturz 10°	2 St.
zu 6	-----	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°, 10°	-
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		8 St.
9 – 12	50 622 20	Einschraubadapter Ø12,7mm x 51 mit 6mm Buchse		2 St.
		kpl.		
9	01 195 01	Einschraubadapter 12,7mm x 51 (1/2")		2 St.
10	50 661 17	Buchse 6mm		2 St.
11	01 330 06	Schnorr-Scheibe NM16 ZN		2 St.
12	01 212 05	Mutter M16x1		2 St.

Alternative Buchsen:

10b	50 661 12	Buchse 18mm	2 St.
10c	50 622 21	Distanzring (Buchse) 15mm (z.B. bei RACY-Seitenteil mit 2° Sturz)	2 St.

Antriebsrad Standard (Alu-Nabe schwarz)

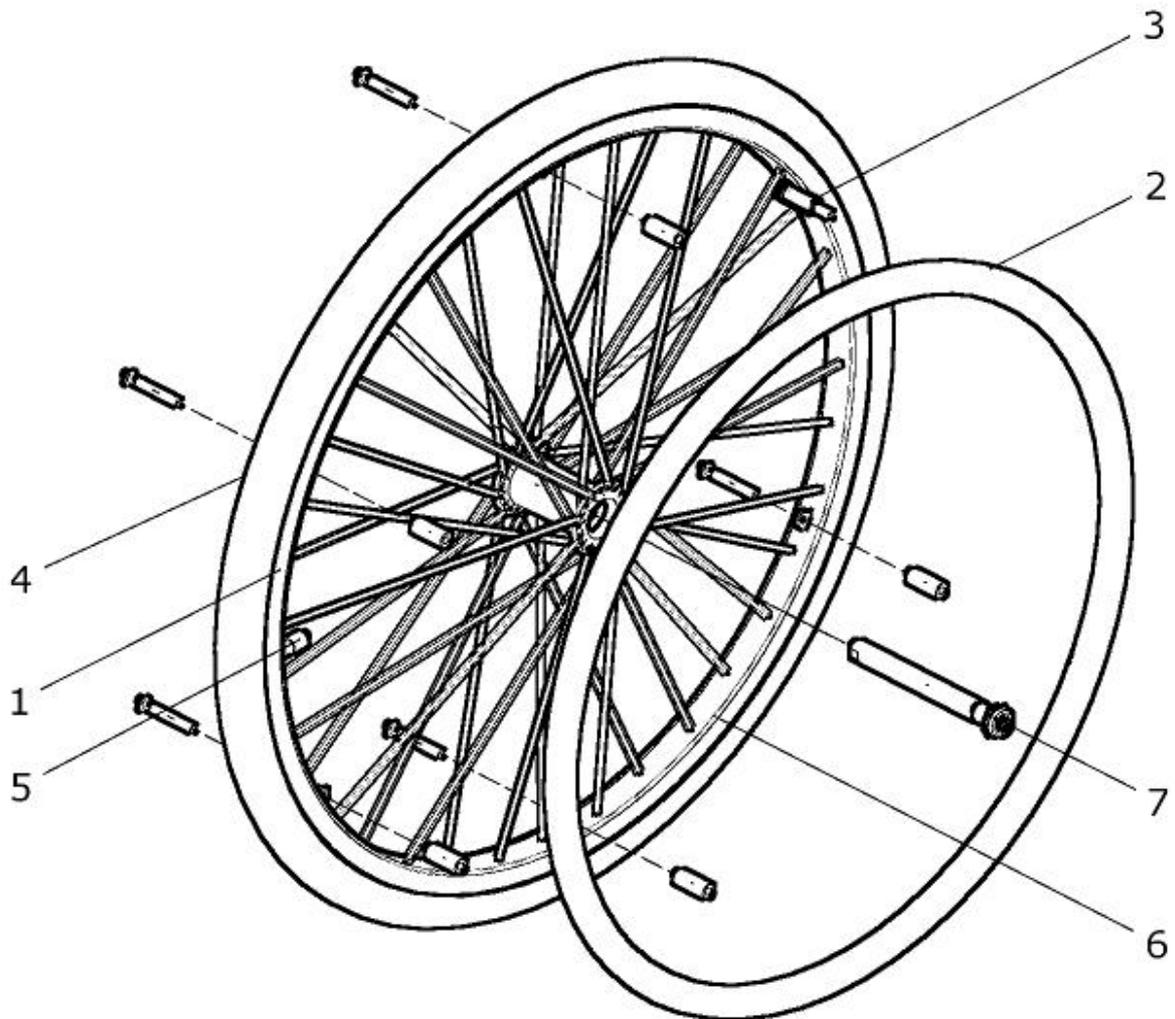

Antriebsrad Standard 22 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	10 610 86	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 89	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 85	Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 87	Antriebsrad 22“x1 3/8 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 88	Antriebsrad 22“x1 Edelstahl / Pannensicher grau kpl. mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 82	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung grobprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 83	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 81	Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 84	Antriebsrad 22“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 6	10 610 80	Antriebsrad 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4c, 5b – 6	10 610 10	Antriebsrad 22“x1 Luftbereifung feinprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	10 610 00	Antriebsrad 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4e – 6	10 610 20	Antriebsrad 22“x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.

1	10 616 00	Speichenrad 22" (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2") (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	10 613 85	Greifring 22" Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	10 613 00	Greifring 22" Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	10 613 30	Greifring 22" Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	10 613 50	Greifring 22" Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a	10 613 56	Greifring 22" Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22" Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22" Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 122 41	Laufdecke 22" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22" x 1" grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22" x 1" pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22" CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 24" CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22" TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Standard 20 Zoll (Alu-Nabe schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1, 2a – 4b, 5b – 6	30 630 82	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4c, 5b – 6	30 630 83	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Luftber. SENTINEL schwarz kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 SENTINEL schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4a, 5a – 6	30 630 85	Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4d, 6	30 630 86	Antriebsrad 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4e, 6	30 630 87	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher grau kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a – 4f, 6	30 630 88	Antriebsrad 20“x1 Alu. schwarz / Pannensicher schwarz kpl. mit Aluminium Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 schwarz (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a, 5a – 6	30 630 05	Antriebsrad 20“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4c	30 630 06	Antriebsrad 20“x1 3/8 Pannensicher grau (ohne Greifung / ohne Steckachse)	1 St.
1, 2a, 3a	30 630 90	Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz eng /ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2a, 3b	30 630 91	Antriebsrad 20“ m Greifring Alu schwarz weit /ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Aluminium-Greifring schwarz , Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3a	30 630 92	Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl eng / ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau eng (ohne Bereifung)	1 St.
1, 2b, 3b	30 630 93	Antriebsrad 20“ m Greifring Edelstahl weit / ohne Bereifung kpl. Speichenrad 20“ mit Edelstahl-Greifring, Anbau weit (ohne Bereifung)	1 St.

1	30 631 05	Speichenrad 20" (gekreuzt gespeicht und schwarz Nabe 1/2") (ohne Bereifung, ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	30 633 20	Greifring 20" Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	30 633 40	Greifring 20" Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	30 633 15	Greifring 20" Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	30 633 30	Greifring 20" Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2a	30 633 21	Greifring 20" Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20" Edelstahl (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20" eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20" weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20" x 1" feinprofil	1 St.
4c	05 120 45	Laufdecke 20" x 1" SENTINEL (schwarze Decke)	1 St.
4d	05 120 51	Bereifung 20" x 1 3/8" pannensicher grau	1 St.
4e	05 120 52	Bereifung 20" x 1" pannensicher grau	1 St.
4f	05 120 53	Bereifung 20" x 1" pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
7	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarze Kappe	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	30 633 65	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.

Antriebsrad SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)



Antriebsrad SAFETY-GRIP 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 4	22 622 80	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 3/8 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 81	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. grobprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 82	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 Luft. feinprofil kpl. Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 4	22 622 83	Antriebsrad SAFETY-GRIP 22“x1 pannensicher grau kpl. Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22“x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 622 55	Speichenrad SAFETY-GRIP 22“ (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2“) L=104 mm schwarz Kappe	1 St.

Antriebsrad TENSIO (mit 18 FIBRE Speichen)



Antriebsrad TENSIO 22 Zoll (schwarz)

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	45 612 81	Antriebsrad TENSIO 22"x1 Alu-Greifring / Luft. feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 2	45 612 41	Antriebsrad TENSIO 22" mit Alu-Greifring schwarz (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
1	45 612 91	Speichenrad TENSIO 22" schwarz (mit Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2	45 612 11	Greifring TENSIO 22" Aluminium schwarz	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	50 622 01	Steckachse Standard Ø12,7mm (1/2") L=104 mm schwarz Kappe	1 St.


Antriebsrad LWW (Lightweightwheels)



Antriebsrad LWW 22 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	22 614 81	Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. schwarz / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring schwarz und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 – 5	22 614 85	Antriebsrad LWW 22"x1 Alu. silber / Luft feinprofil kpl. mit Aluminium Greifring silber und Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 614 89	Speichenrad LWW 22" (gerade gespeicht / schwarze Nabe 1/2") (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a	22 613 10	Greifring LWW 22" Aluminium schwarz eloxiert kpl.	1 St.
2b	22 613 15	Greifring LWW 22" Aluminium silber eloxiert kpl.	1 St.
2c	22 613 84	Greifring CURVE 22" / Lasche für LWW 22" Aluminium schwarz.	1 St.
3a	05 122 43	Laufdecke 21" x 1" feinprofil	1 St.
3b	05 121 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
5	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
6	40 612 01	Steckachse LWW Ø12,7mm (1/2") L=99mm schwarz Kappe	1 St.

Lochplatte Trommelbremse (innen montiert)

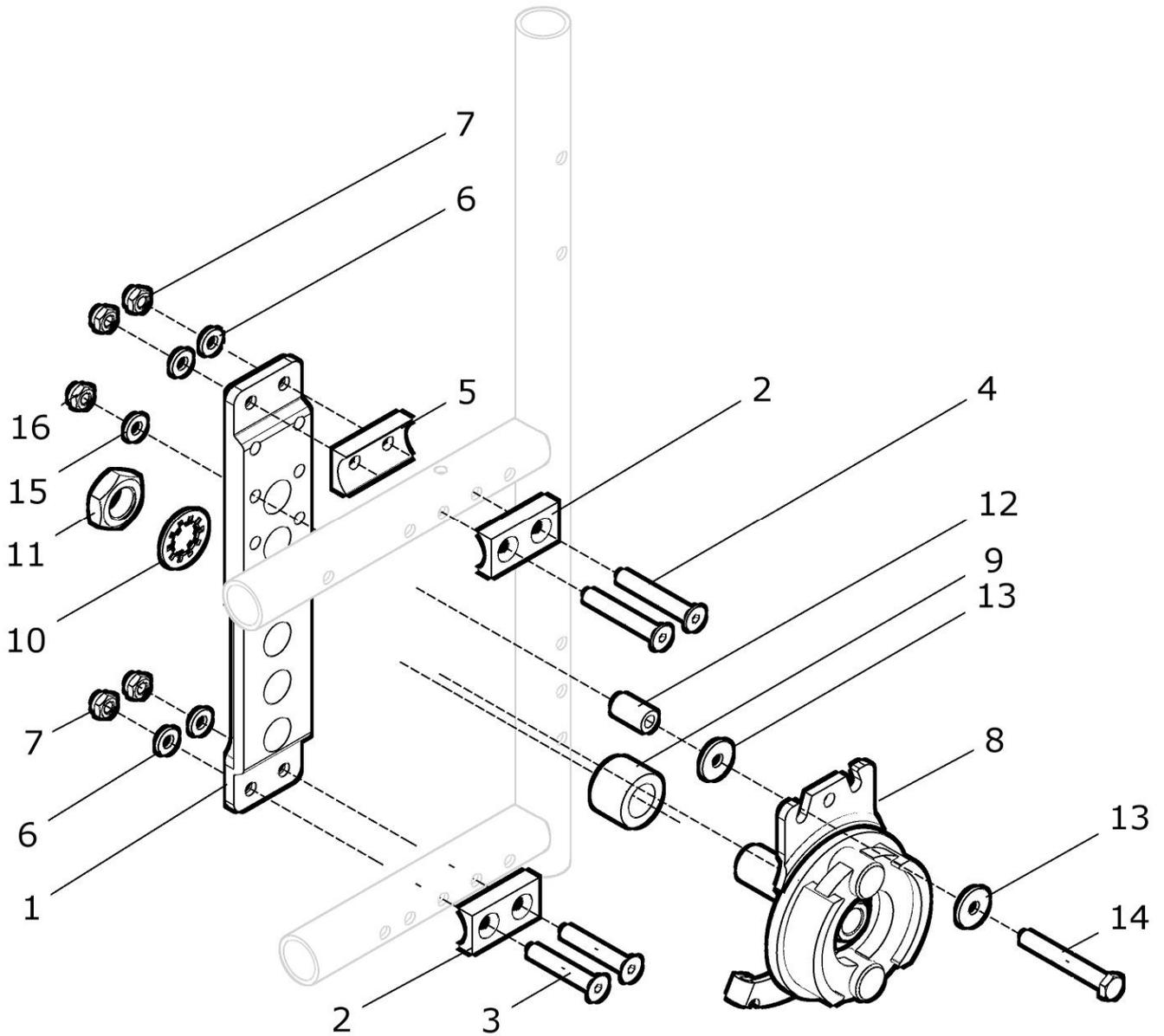

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 00	Lochplatte für Trommelbremse innen montiert kpl. Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben Sturz: 2°	2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)	1 St.
9	50 661 12	Distanzscheibe 18mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW24	2 St.
12	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
14	01 110 08	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte Trommelbremse (außen montiert)

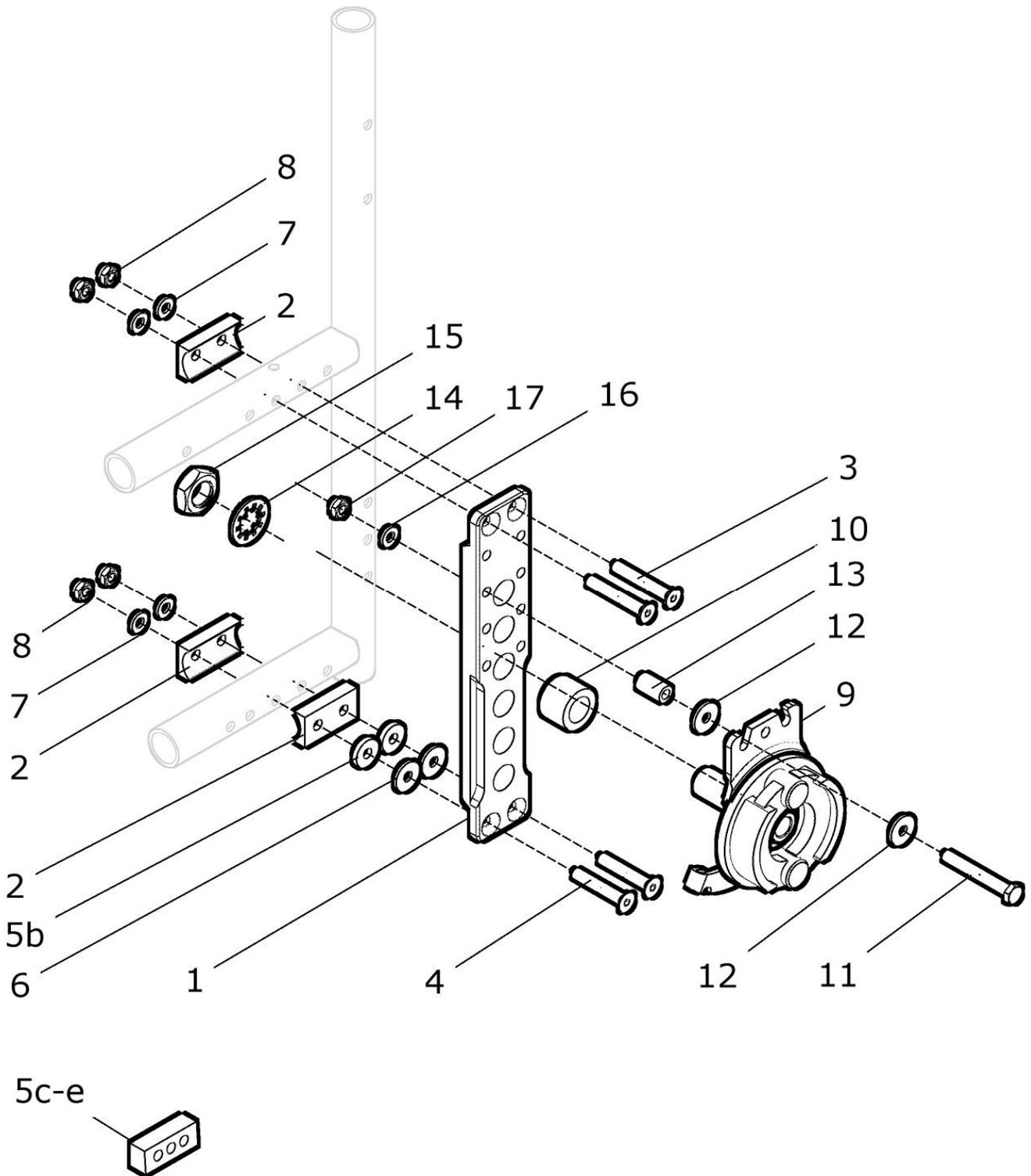


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1 – 8	50 661 10	Lochplatte für Trommelbremse außen montiert kpl. Lochplatte Tr.br. mit Halbschalen und Schrauben Sturz: ?		2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2 – 4e, 5d, 7, 8	50 621 99	Montageset	Sturz 10°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
4e	01 120 24	Senkschraube M6x80 - DIN 7991	Sturz 10°	4 St.
zu 5	-----	Ohne Scheibe		-
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
5d	50 621 08	Distanzblock 33mm		2 St.
zu 6	-----	Ohne Scheibe		-
6	01 320 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		8 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		8 St.
9b–17	50 662 10	Bremsträger Trommelbremse rechts kpl. (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		2 St.
9a–17	50 663 10	Bremsträger Trommelbremse links kpl. (bei Lochplatte außen montiert) Distanz: ? (Distanz 6 / 9 / 15 / 18 / 20mm)		2 St.
9a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A (links)		1 St.
9b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B (rechts)		1 St.

10a	50 661 17	Distanz 6mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L6mm)	2 St.
10b	01 212 05	Distanz 9mm	(= Mutter M16x1 SW22)	2 St.
10c	50 622 21	Distanz 15mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L15mm)	2 St.
10d	50 661 12	Distanz 18mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L18mm)	2 St.
10e	50 622 22	Distanz 20mm	(Distanzscheibe D25 x d16 x L20mm)	2 St.
11a	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	(bei 6mm Distanz)	2 St.
11b	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	(bei 9mm Distanz)	2 St.
11c	01 110 06	Sechskantschraube M6x40 - DIN 931	(bei 15mm Distanz)	2 St.
11d	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931	(bei 18mm Distanz)	2 St.
11e	01 110 08	Sechskantschraube M6x50 - DIN 931	(bei 20mm Distanz)	2 St.
12	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
13a	25 225 13	Distanzröllchen 6mm	(D13 x d6,2 x L6) (bei 6mm Distanz)	2 St.
13b	50 661 15	Distanzröllchen 9mm	(D10 x d6 x L9) (bei 9mm Distanz)	2 St.
13c	U25 661 03	Distanzröllchen 14mm	(D10 x d6 x L14) (bei 15mm Distanz)	2 St.
13d	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	(D10 x d6 x L18) (bei 18mm Distanz)	2 St.
13e.1	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	(D10 x d6 x L18) (bei 20mm Distanz)	2 St.
13e.2	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	(bei 20mm Distanz)	2 St.
14	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN		2 St.
15	01 212 06	Mutter M16x1 SW24		2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		2 St.
17	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985		2 St.

Die Distanzen 6mm, 9mm, 15mm, 18mm oder 20mm (Pos. 10, 11 und 13) werden je nach Seitenteil, je nach Sturz oder je nach Bereifung angebaut.

Antriebsrad Trommelbremse

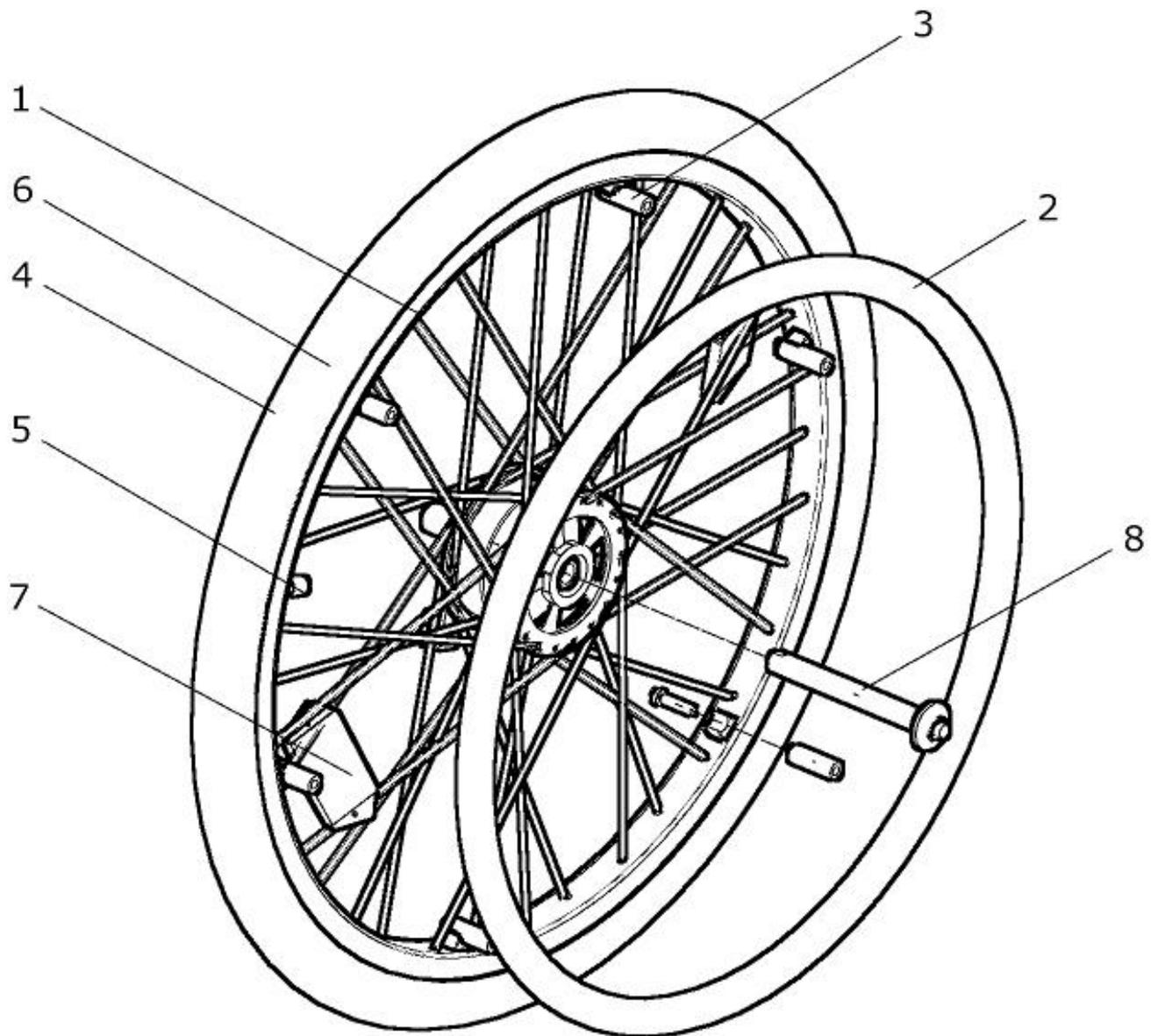

Antriebsrad Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 81	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / Luftbereifung grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 82	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 85	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Edelstahl / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Edelstahlgreifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 83	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 87	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 22“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 84	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 86	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 22“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 4a – 7	10 661 50	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 3/8 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1, 4b – 7	10 661 51	Antriebsrad Tr.br. 22“x1 Luftbereifung grobprofil (ohne Greifring / ohne Steckachse)	1 St.
1	10 661 55	Speichenrad Trommelbremsnabe 22“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	10 613 55	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	10 613 85	Greifring 22“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	10 613 00	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.

2b – 3b	10 613 30	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2c – 3a	10 613 50	Greifring 22“ Aluminium silber / Anbau eng kpl.	1 St.
2a	10 613 56	Greifring 22“ Aluminium schwarz	1 St.
2b	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
2c	10 613 51	Greifring 22“ Aluminium silber	1 St.
3a	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 St.
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set weit kpl. (Set mit 6 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 St.
4a	05 122 41	Laufdecke 22“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 122 42	Laufdecke 22“ x 1“ grobprofil	1 St.
4c	05 122 43	Laufdecke 22“ x 1“ feinprofil	1 St.
4d	05 122 48	Laufdecke 22“ x 1“ Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
4e	05 122 51	Bereifung 22“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
4f	05 122 52	Bereifung 22“ x 1 pannensicher grau	1 St.
4g	05 122 53	Bereifung 22“ x 1 pannensicher schwarz	1 St.
5a	05 122 21	Schlauch 22“ x 1 3/8“	1 St.
5b	05 122 22	Schlauch 22“ x 1“	1 St.
6	05 122 03	Felgenband 22“ / 24“	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	10 613 35	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 38	Greifring 22“ Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 84	Greifring 22“ CURVE / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2 - 3	10 613 94	Greifring 22“ CURVE T-GRIP / M5 Ösen / Anbau eng kpl.	1 St.
2	05 122 70	Greifring 22“ TETRA-GRIP	1 St.

Antriebsrad Trommelbremse 20 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	10 661 72	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / Luftbereifung grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 71	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / Luftbereifung fein kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und Luftbereifung 20“x1 feinprofil (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 74	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 3/8 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 3/8 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1 – 7	10 661 73	Antriebsrad Tr.br. 20“x1 Alu. schwarz / pannensicher grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und mit Aluminium Greifring und pannensicherer Bereifung 20“x1 grau (ohne Steckachse) Anbau: eng / weit ? (Anbau eng ist standard)	1 St.
1, 2a, 3a	10 661 79	Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau eng (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: eng	1 St.
1, 2a, 3b	10 661 78	Antriebsrad Tr.br. 20“ Alu.-Greifring schwarz Anbau weit (ohne Bereifung / ohne Steckachse) Anbau: weit	1 St.
1	10 661 65	Speichenrad Trommelbremsnabe 20“ (ohne Bereifung / ohne Greifring)	1 St.
2a – 3a	30 633 20	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau eng kpl.	1 St.
2a – 3b	30 633 40	Greifring 20“ Aluminium schwarz / Anbau weit kpl.	1 St.
2b – 3a	30 633 15	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
2b – 3b	30 633 30	Greifring 20“ Edelstahl / Anbau weit kpl.	1 St.
2a	30 633 21	Greifring 20“ Aluminium schwarz (mit 4x M5)	1 St.
2b	30 633 31	Greifring 20“ Edelstahl (mit 4x M5)	1 St.
3a	30 633 25	Greifringanbau-Set 20“ eng kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x45 und Distanzen kurz schwarz L=27mm)	1 Set
3b	50 623 34	Greifringanbau-Set 20“ weit kpl. (Set mit 4 Schrauben M5x50 und Distanzen lang grau L=35mm)	1 Set
4a	05 120 41	Laufdecke 20“ x 1 3/8“ grobprofil	1 St.
4b	05 120 42	Laufdecke 20“ x 1“ feinprofil	1 St.
4c	05 120 51	Bereifung 20“ x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.

4d	05 120 52	Bereifung 20" x 1 pannensicher grau	1 St.
5a	05 120 21	Schlauch 20" x 1 3/8"	1 St.
5b	05 120 22	Schlauch 20" x 1"	1 St.
6	05 122 03	Felgenband	1 St.
7	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
8	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Sonder-Greifringe:

2 - 3	30 633 65	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA kpl.	1 St.
2 - 3	30 633 68	Greifring 20" Maxgrepp ERGO PARA CP kpl.	1 St.


Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP (Felge mit integriertem Greifring)



Antriebsrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22 Zoll


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	22 662 80	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22"x1 3/8 Luft. grob kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22"x1 3/8 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	22 662 81	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22"x1 Luft. grobprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22"x1 grobprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	22 662 82	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22"x1 Luft. feinprofil kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring, mit Luftbereifung 22"x1 feinprofil (ohne Steckachse)	1 St.
1 - 4	22 662 83	Antriebsrad Tr.br. mit SAFETY-GRIP 22"x1 pannen. grau kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe und Felge mit integriertem Greifring und pannensichere Bereifung 22"x1 gr (ohne Steckachse)	1 St.
1	22 662 55	Speichenrad Trommelbremse und SAFETY-GRIP 22" (ohne Bereifung / ohne Steckachse)	1 St.
2a	05 122 41	Laufdecke 22" x 1 3/8" grobprofil	1 St.
2b	05 122 42	Laufdecke 22" x 1" grobprofil	1 St.
2c	05 122 43	Laufdecke 22" x 1" feinprofil	1 St.
2d	05 122 48	Laufdecke 22" x 1" Marathon Plus Evolution (schwarze Decke)	1 St.
2e	05 122 51	Bereifung 22" x 1 3/8 pannensicher grau	1 St.
2f	05 122 52	Bereifung 22" x 1 pannensicher grau	1 St.
2g	05 122 53	Bereifung 22" x 1 pannensicher schwarz	1 St.
3a	05 122 21	Schlauch 22" x 1 3/8"	1 St.
3b	05 122 22	Schlauch 22" x 1"	1 St.
4	05 122 03	Felgenband 22" / 24"	1 St.
o. Bild	04 240 11	Speichenreflektor	2 St.
5	50 661 02	Steckachse Trommelbremse Ø12mm L=108 mm Kappe silber	1 St.

Speichenschutz

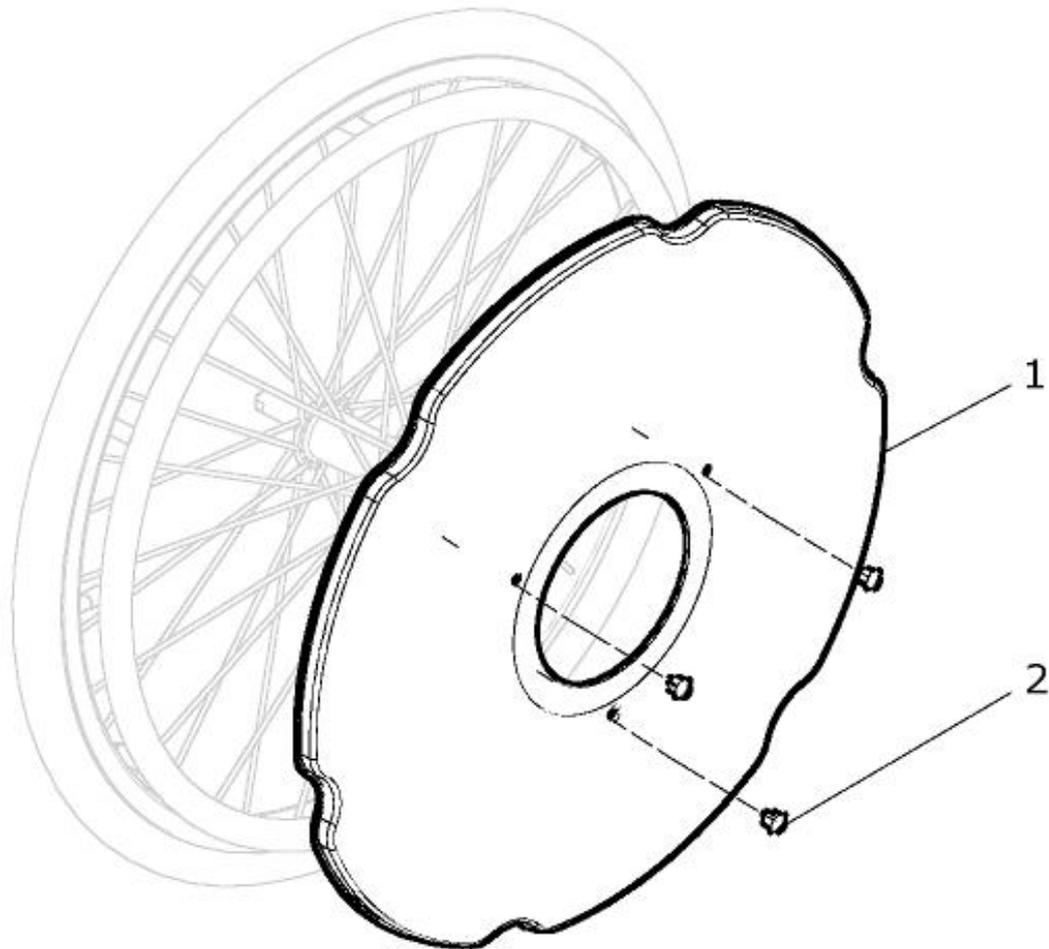


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	10 624 00	Speichenschutz 20" transparent kpl.	1 St.
1	10 624 01	Speichenschutz 20" transparent	1 St.
o. Bild	04 250 03	Aufkleber BeRollKa	2 St.
2	50 624 91	Clip für Speichenschutzbefestigung	3 St.
1 – 2	10 614 00	Speichenschutz 22" transparent kpl.	1 St.
1	10 614 01	Speichenschutz 22" transparent	1 St.
1 – 2	50 624 00	Speichenschutz 24" transparent kpl.	1 St.
1	50 624 01	Speichenschutz 24" transparent	1 St.

Greifringüberzug

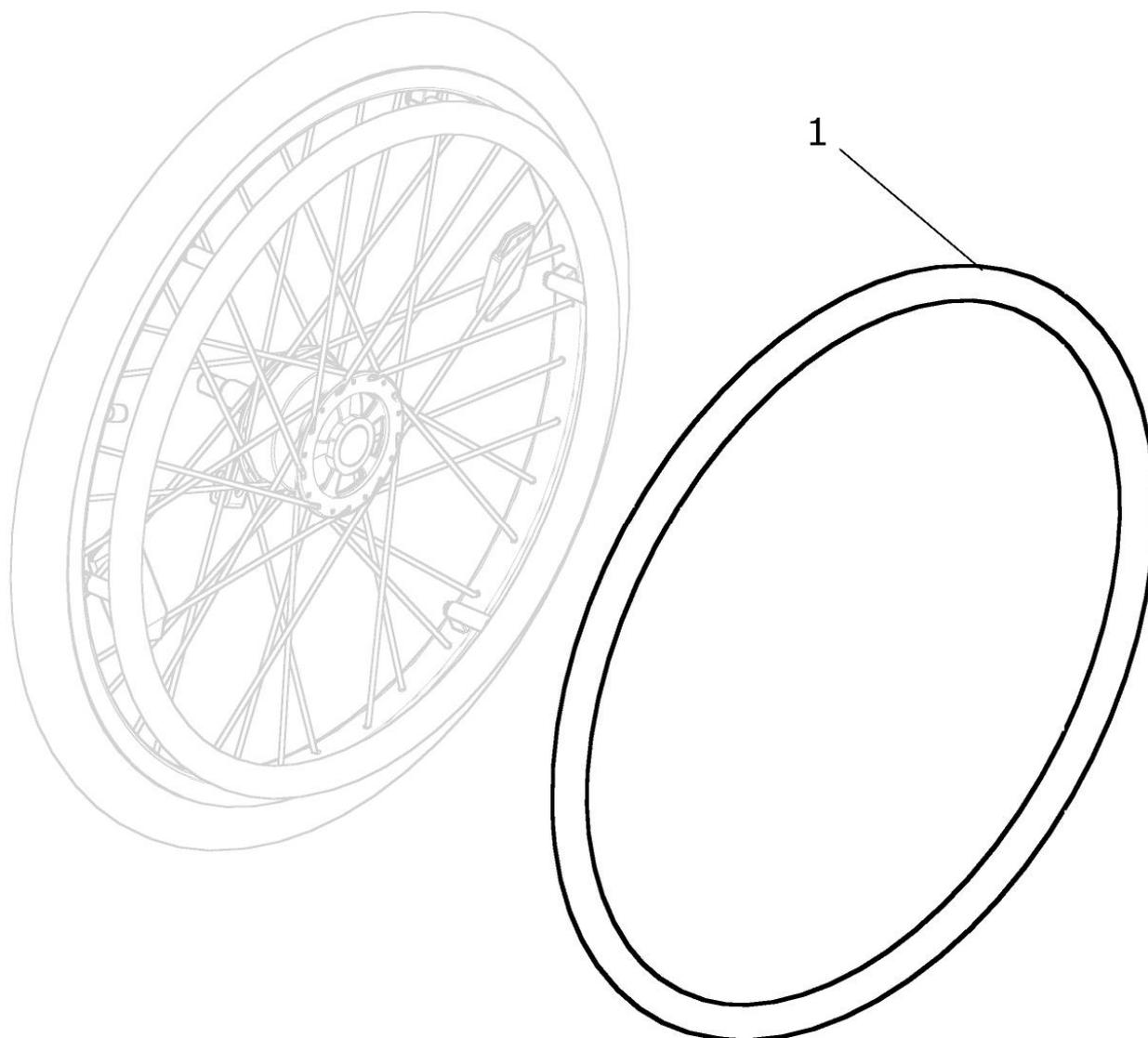


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1	05 120 11	Greifringüberzug 20" glatt schwarz	1 St.
1	05 122 11	Greifringüberzug 22" glatt schwarz	1 St.
1	05 124 11	Greifringüberzug 24" glatt schwarz	1 St.

Radstandsverlängerung standard

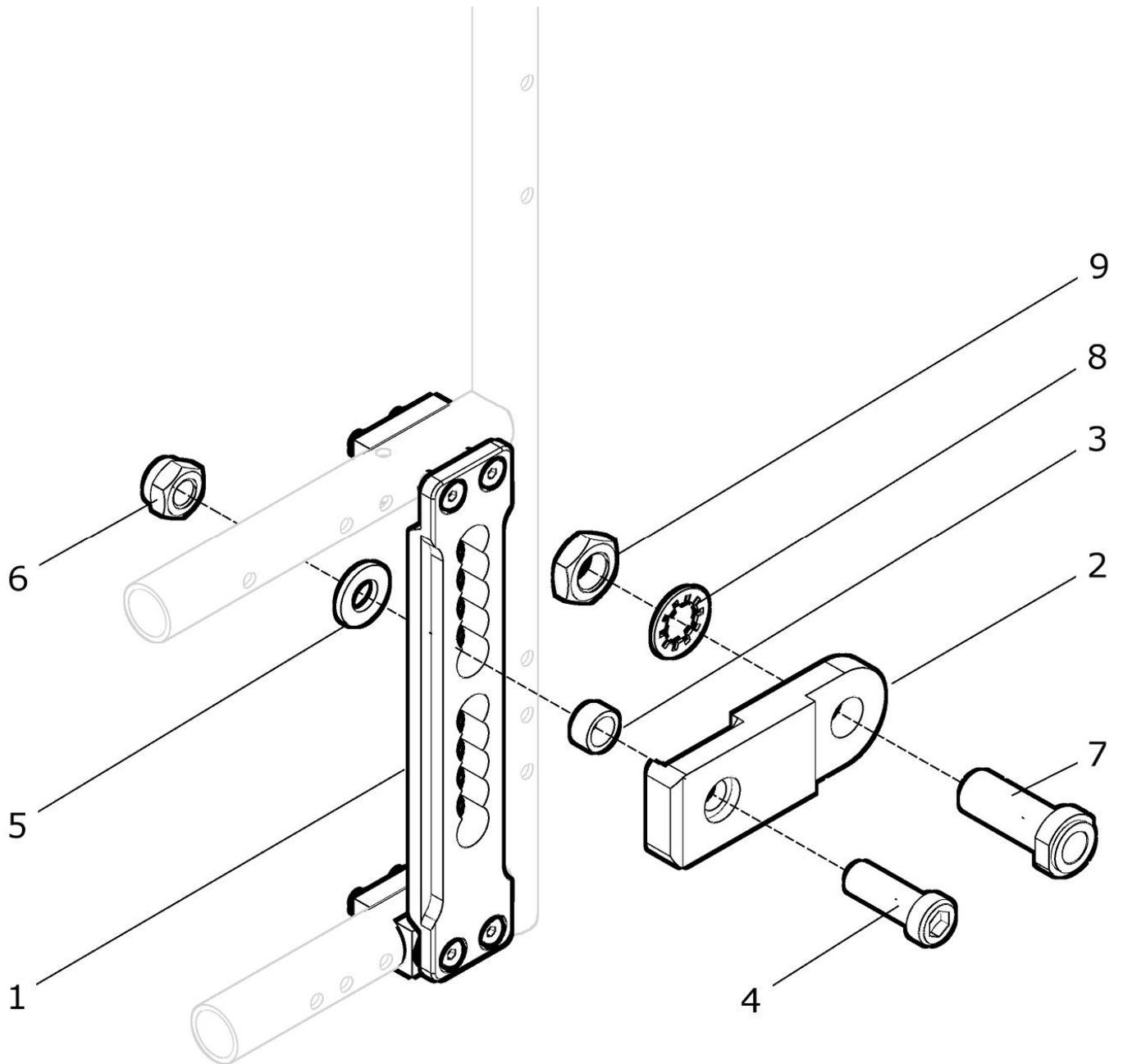

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	50 625 10	Radstandsverlängerung mit Lochplatte standard kpl. mit Montageset 0° Sturz ohne Einschraubadapter	2 St.
1	50 621 10	Lochplatte standard außen montiert kpl. mit Montageset 0° Sturz	2 St.
2a - 6	50 625 00	Radstandsverlängerung kpl. ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (68mm nach hinten)	2 St.
2a	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 625 02	Buchse	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
6	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
7 – 9	50 622 25	Einschraubadapter ½"x51mm ohne Buchse kpl.	2 St.
7	01 195 01	Einschraubadapter	2 St.
8	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
9	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	2 St.
2b - 6	50 625 20	Radstandsverlängerung UNITOMIC kpl. ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter (100mm nach hinten)	2 St.
2b	50 625 21	Radstandsverlängerung unitomic (100mm nach hinten)	2 St.

Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter

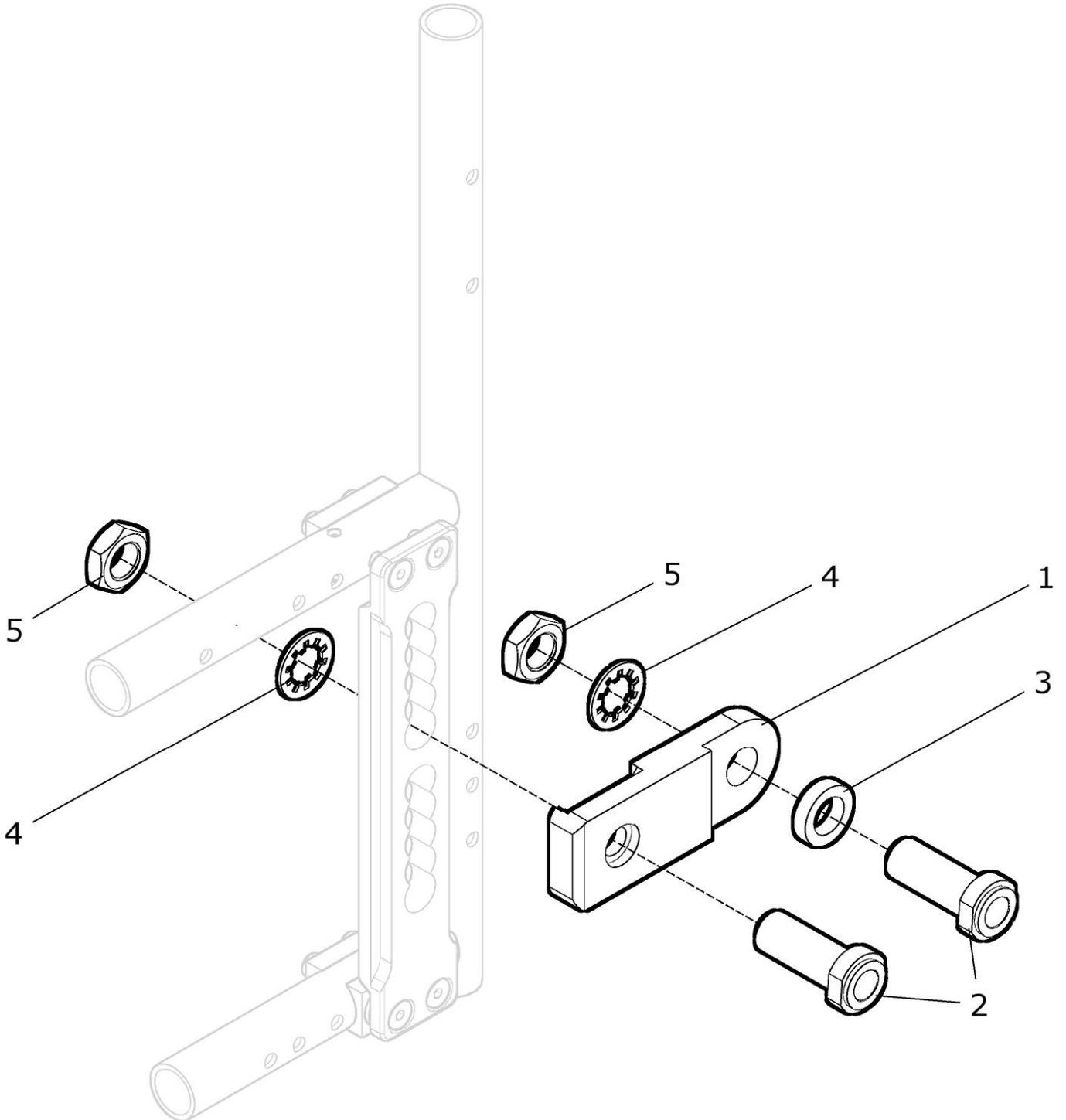

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 5	50 625 50	Radstandsverlängerung mit 2 Einschraubadapter kpl. ohne Lochplatte (68mm nach hinten)	2 Set
1	50 625 51	Radstandsverlängerung für 2 Adapter (68mm nach hinten)	2 St.
2	01 195 01	Einschraubadapter ½" x 51mm	4 St.
3	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
4	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	4 St.
5	01 212 05	Mutter M16x1 SW22	4 St.


vorne eingebaut:

2, 4 – 5	50 622 25	Einschraubadapter ½"x51mm ohne Buchse kpl. mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	2 St.
-------------	-----------	--	-------

hinten eingebaut:


2 – 5	50 622 20	Einschraubadapter ½"x51mm mit 6mm Buchse kpl. mit Mutter M16x1 und Schnorr-Sicherungsscheibe	2 St.
-------	-----------	---	-------

Radstandsverlängerung für Trommelbremse

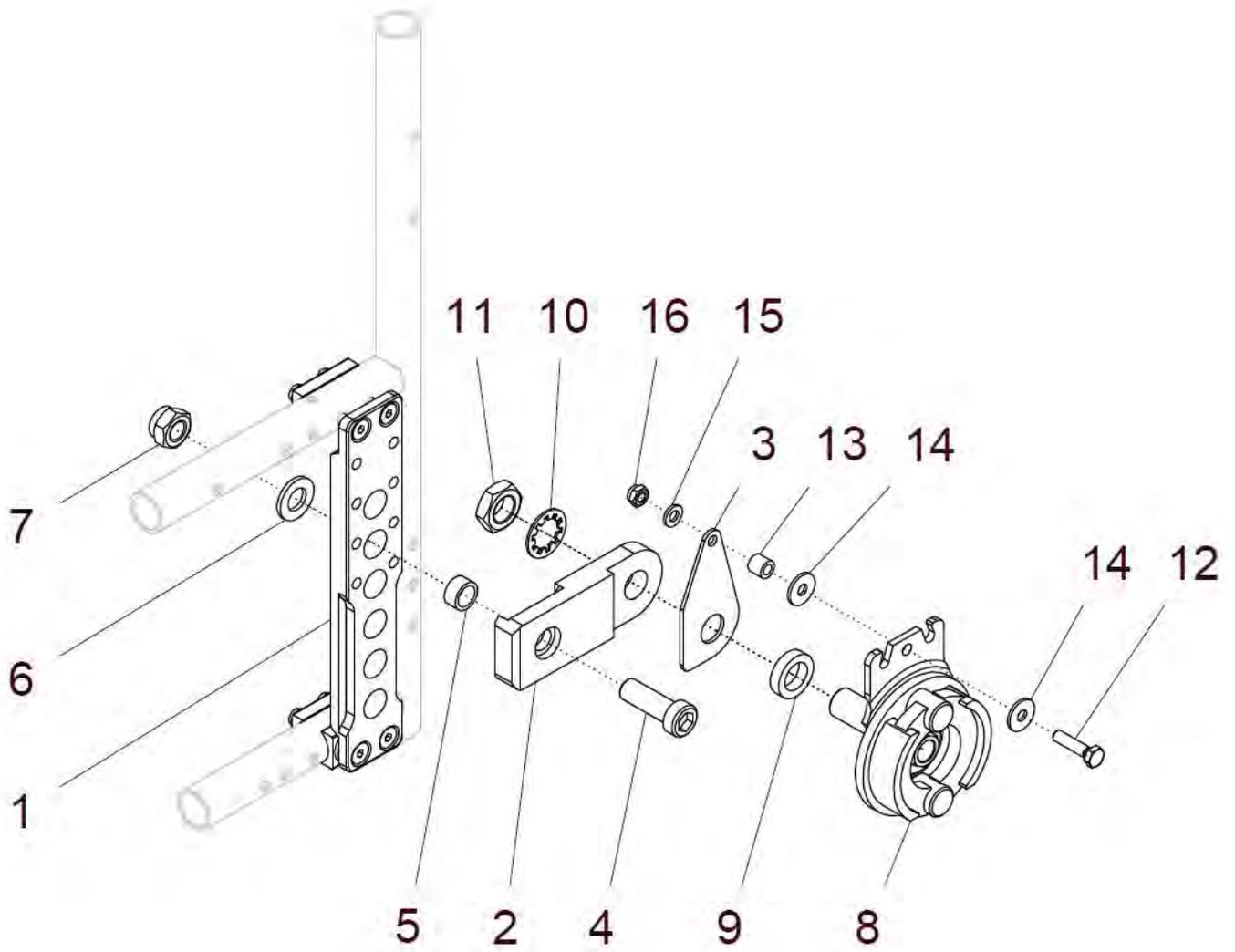

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 7	50 661 25	Radstandsverlängerung für Trommelbremse mit Lochplatte kpl. Radstandsverlängerung (68mm nach hinten) mit Gegenhalter und mit Lochplatte für Trommelbremse für 0° Sturz (ohne Bremsträger)	2 St.
1	50 661 01	Lochplatte für Trommelbremse	2 St.
2 – 7	50 661 20	Radstandsverlängerung Trommelbremse kpl. mit Gegenhalter (Radstandsverlängerung 68mm nach hinten) ohne Lochplatte / ohne Bremsträger	2 St.
2	50 625 01	Radstandsverlängerung (68mm nach hinten)	2 St.
3	50 661 21	Gegenhalter	2 St.
4	01 161 62	Zylinderkopfschraube M12x35 - DIN 6912	2 St.
5	50 625 02	Buchse	2 St.
6	01 320 15	Scheibe 13 - DIN 125	2 St.
7	01 210 36	Sechskantmutter M12 - DIN 985	2 St.
8a	05 110 13	Bremsträger Trommelbremse SIDE-A rechts montiert (Hebel zeigt nach rechts) <small>Wird bei Radstandsverlängerung auf die rechte Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.</small>	1 St.
8b	05 110 12	Bremsträger Trommelbremse SIDE-B links montiert (Hebel zeigt nach links) <small>Wird bei Radstandsverlängerung auf die linke Seite montiert, damit der Hebel nach hinten zeigt.</small>	1 St.
9	50 661 17	Buchse 6mm	2 St.
10	01 330 06	Schnorr-Sicherungsscheibe NM16 ZN	2 St.
11	01 212 06	Mutter M16x1 SW 24	2 St.
12	01 110 05	Sechskantschraube M6x35 - DIN 931	2 St.
13	50 661 15	Distanzröllchen 9mm	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	4 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	2 St.
16	01 210 33	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring - Little

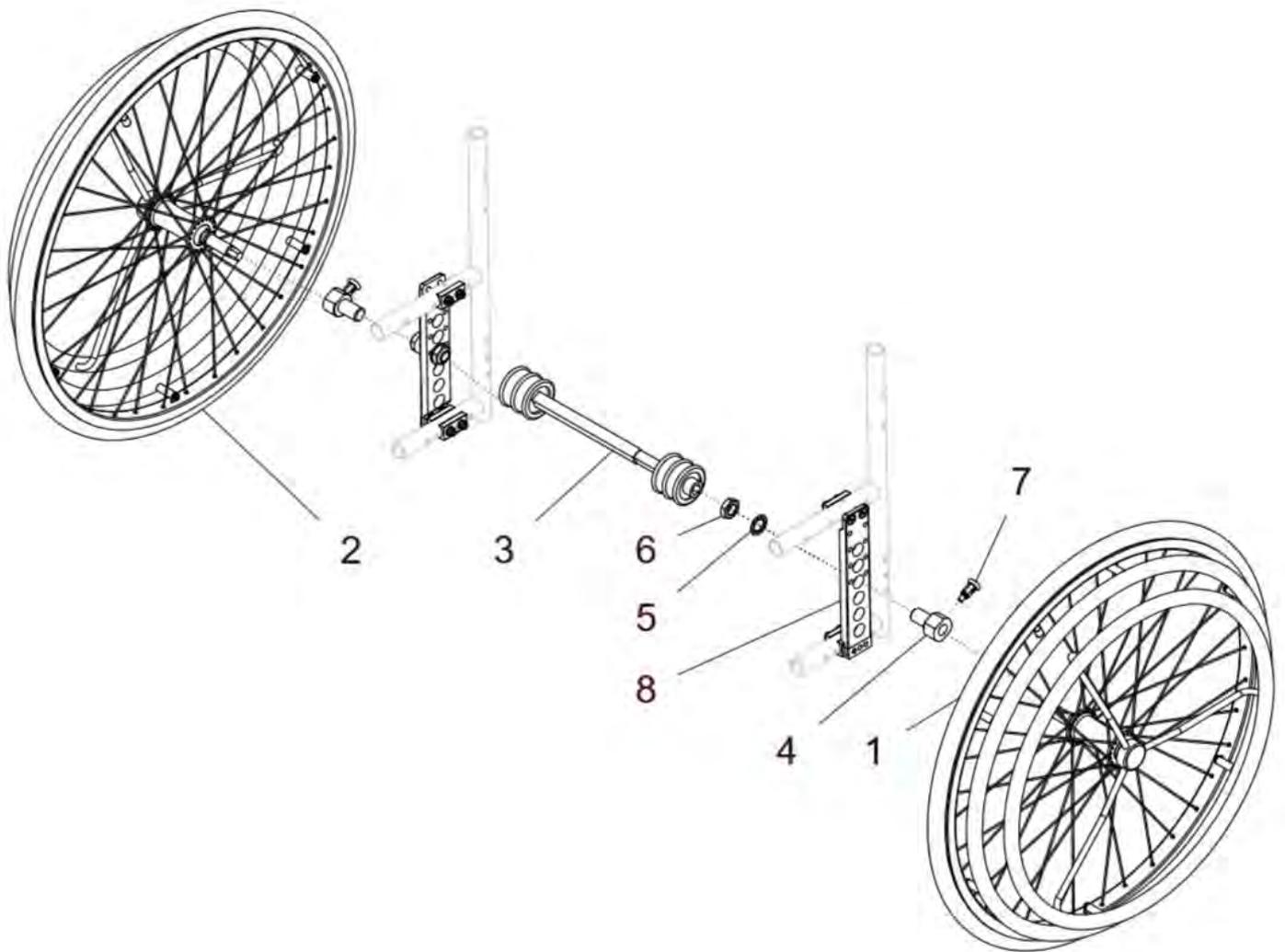


Einhandantrieb 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	10 670 00	Einhandantrieb 22" Doppelgreifring kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b - 7	22 670 00	Einhandantrieb 22" Doppelgreifring eng kpl Antriebsrad mit Doppelgreifring eng Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 672 00	Antriebsrad 22" mit Doppel-Greifring Edelstahl mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 672 00	Antriebsrad 22" mit Doppel-Greifring Edelstahl eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 672 50	angetriebene Rad 22" ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenken 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenken 25,5 - 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenken 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenken 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenken 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4 - 7	50 671 10	Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen	2 St.
4	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb	2 St.
5	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 ZN	2 St.
6	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
7	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)	2 St.

Lochplatte für Einhandantrieb (außen montiert)

0°, 2°, 4°, 7°Sturz

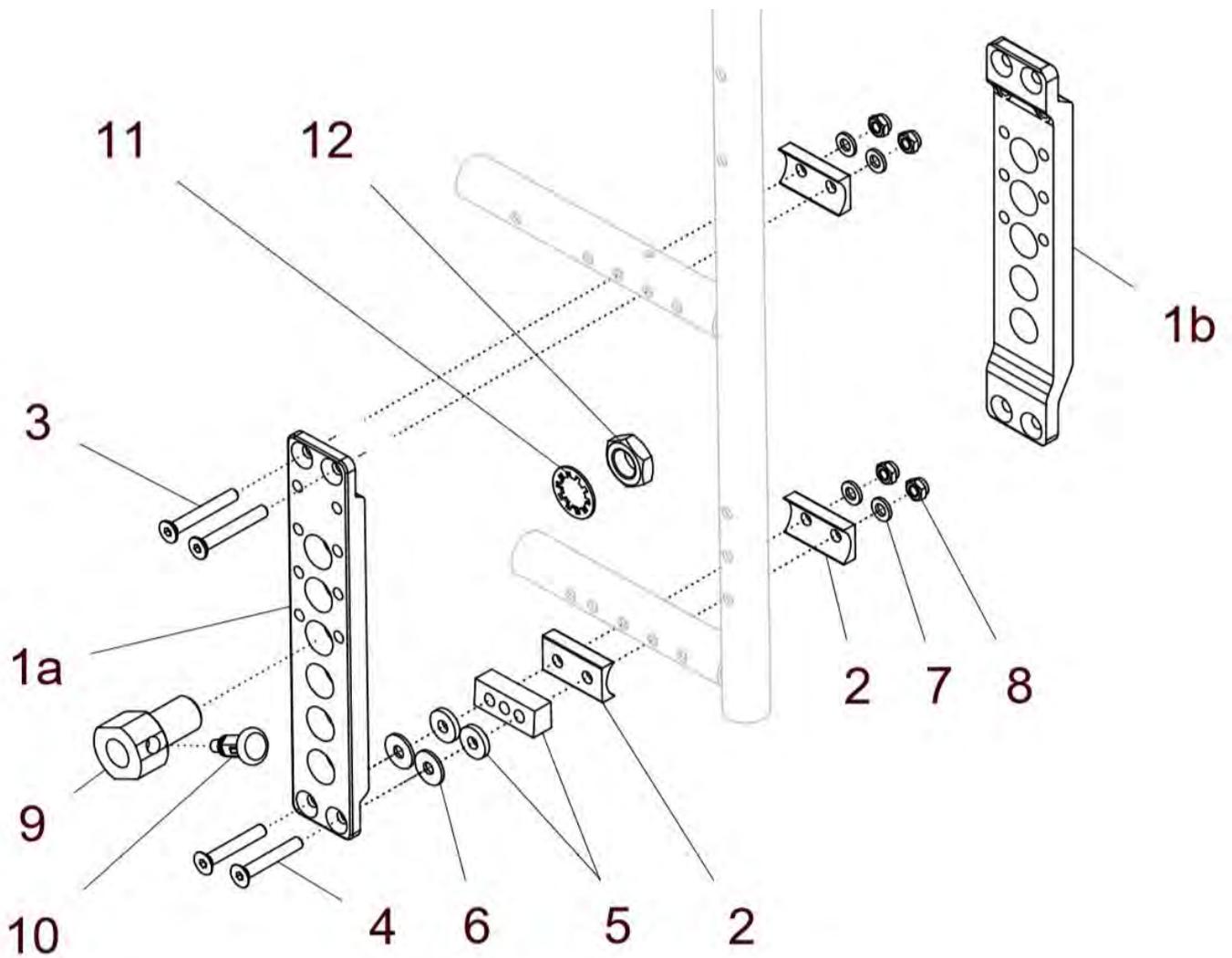

Lochplatte gerade:


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	50 671 00	Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
9 – 12	50 671 10	Einschraubadapter für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen		2 St.
9	50 671 11	Einschraubadapter für Einhandantrieb		2 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (mit M10x1 / d.6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM 18 zn		2 St.
12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter EHA		2 St.

Lochplatte tief:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	50 671 05	Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe		--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349		4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm		2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm		2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe		4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021		4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Einhandantrieb mit Doppelgreifring und mit Trommelbremse - Little

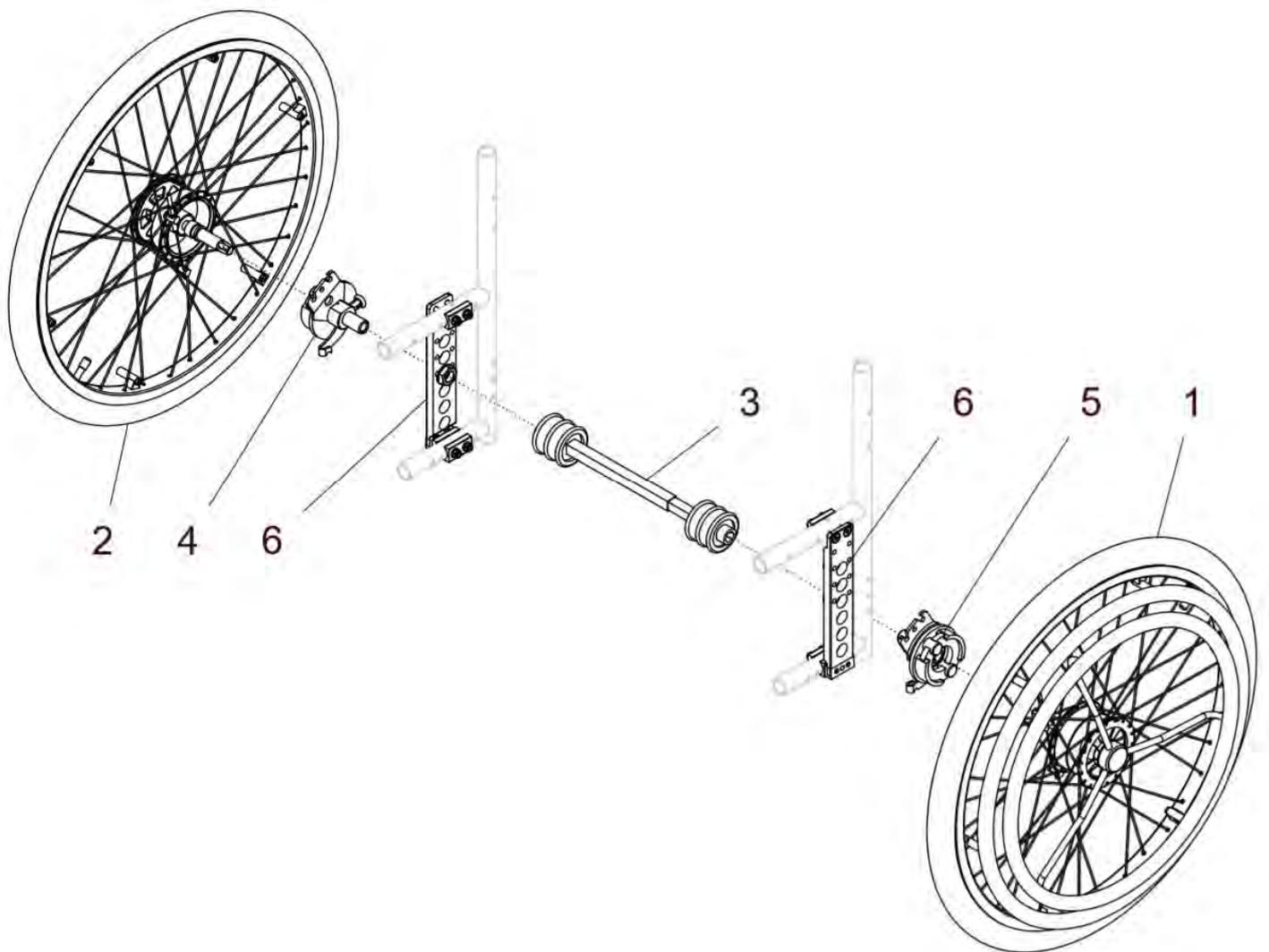

Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 5	10 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1b – 5	22 675 00	Einhandantrieb Trommelbremse 22“ Doppelgreifring eng kpl. Antriebsrad mit Trommelbremsnabe mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Verbindungswelle, mit Bowdenzug und mit Bremsgriff (ohne Lochplatte) SB: ? Bereifung: ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
1a	10 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Bremsträger) Bereifung: ?	1 St.
1b	22 677 00	Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppel-Greifring eng mit Doppelgreifring aus Edelstahl (ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ?	1 St.
2	10 677 50	angetriebene Rad Trommelbremse 22“ ohne Greifring (ohne Greifring / ohne Lochplatte / ohne Einschraubadapter) Bereifung: ? (Greifring siehe Pos. 9)	1 St.
3a	05 141 05	Verbindungsstück mit Kardangelenken 22 - 27,5cm (SB 30 - 34cm)	1 St.
3b	05 141 00	Verbindungsstück mit Kardangelenken 25,5 – 31,5cm (SB 34 - 36cm)	1 St.
3c	05 141 01	Verbindungsstück mit Kardangelenken 29,5 - 37cm (SB 38 - 42cm)	1 St.
3d	05 141 02	Verbindungsstück mit Kardangelenken 35 - 46cm (SB 44 - 52cm)	1 St.
3e	05 141 03	Verbindungsstück mit Kardangelenken 42 - 53cm (SB 50 - 58cm)	1 St.
4	50 676 20	Bremsträger Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, rechte Seite	1 St.
5	50 676 30	Bremsträger Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen, linke Seite	1 St.

6a	50 671 00	Lochplatte gerade für Einhandantrieb außen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6b	50 671 50	Lochplatte gerade für Einhandantrieb innen montiert kpl. mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
6c	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) außen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: außen Sturz: ? (außen max. 7° Sturz möglich)	2 St.
6d	50 671 05	Lochplatte tief für Einhandantrieb (standard) innen montiert kpl. Lochplatte 5mm tiefer; mit Halbschalen und Schrauben Montage: innen Sturz: ? (innen max. 2° Sturz möglich)	2 St.
7 o. Bild	10 613 00	Greifring 22“ Edelstahl / Anbau eng kpl.	1 St.
7.1	10 613 01	Greifring 22“ Edelstahl	1 St.
7.2	50 623 04	Greifringanbau-Set eng kpl.	1 St.

Hinweis zu Position 3:

Die angegebenen Sitzbreiten bei den jeweiligen Verbindungsstücken sind bei Lochplatte außen und mit 0° - 2° Sturz betrachtet.


Bei 4° Sturz bitte die Sitzbreite 2cm größer annehmen und bei 7° Sturz die Sitzbreite bitte 4cm größer annehmen.

Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22 Zoll

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
	10 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. Kpl. Antriebsrad Trommelbremse 22“ mit Doppelgreifring Edelstahl und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse, mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz
	22 675 80	Umbausatz Einhandantrieb Trommelbremse 22“ D.-Gr. eng kpl. Antriebsrad Trommelbremse mit Doppelgreifring Edelstahl eng und mit angetriebenem Rad mit steckbarer Achse und mit Bremsträger, Bowdenzüge und Bremsgriffe und mit Verbindungswelle, mit Lochplatte und Montagezubehör SB: ? Bereifung: ? Lochplatte: gerade / tief ? Montage Lochplatte: außen / innen ? (Die Räder können rechts oder links montiert werden !!)	1 Satz

**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse
(außen montiert)**

0° / 2° / 4° / 7° Sturz

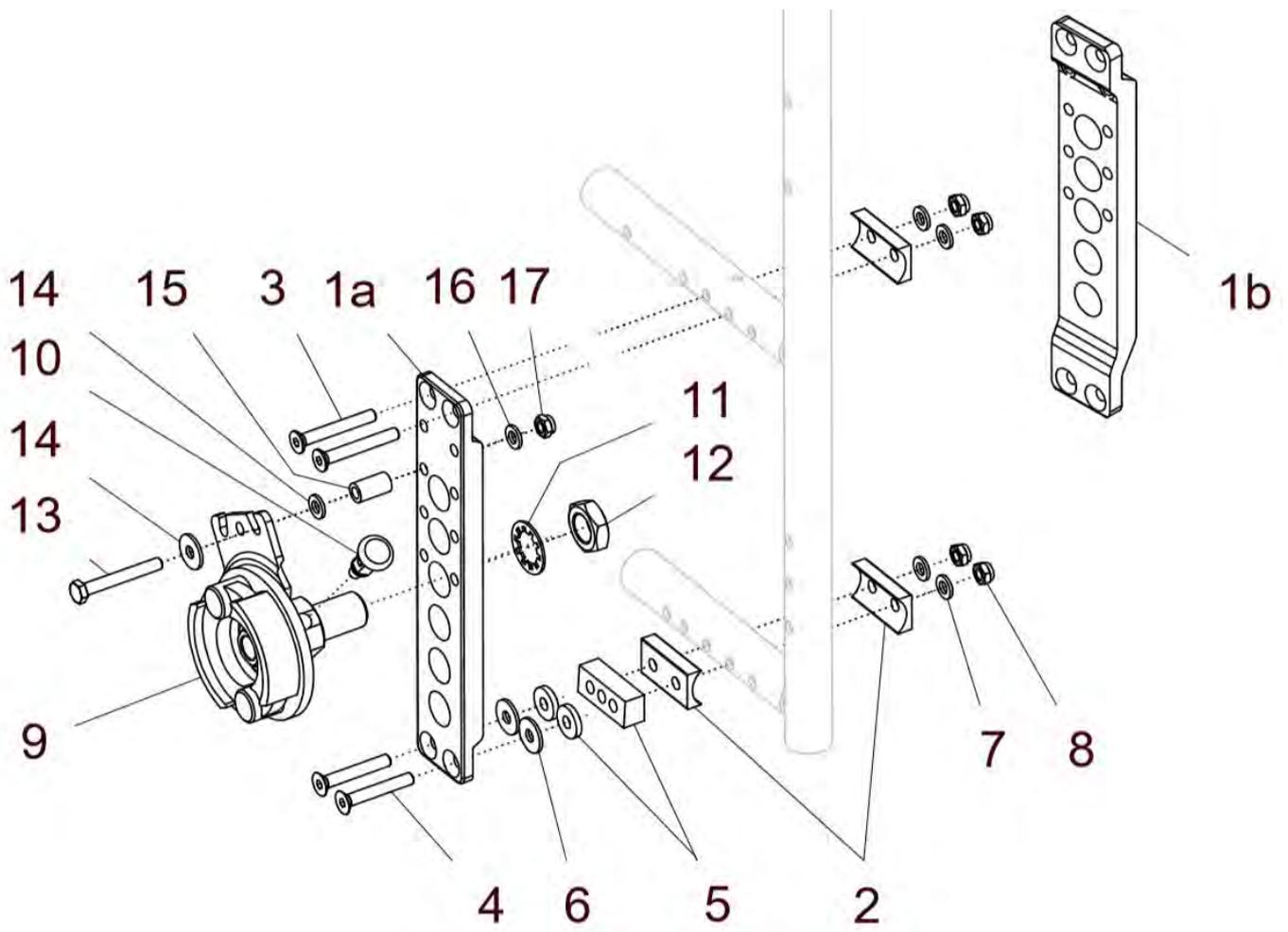

Lochplatte gerade:

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1a – 8	50 671 00	Lochplatte gerade für EHA außen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
9a – 17	50 676 20	Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9b – 17	50 676 30	Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)		1 St.
9a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)		1 St.
9b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)		1 St.
10	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)		2 St.
11	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn		2 St.


12	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
13	01 110 07	Sechskantschraube M6x45 - DIN 931 A2	2 St.
14	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
15	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
16	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
17	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief:

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung		Menge
1b – 8	50 671 05	Lochplatte tief für EHA außen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: ? (0°, 2°, 4° oder 7° Sturz)		2 St.
1b	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)		2 St.
2 – 4a, 7 – 8	50 621 90	Montageset	Sturz 0°	2 St.
2 – 4b, 5a – 8	50 621 92	Montageset	Sturz 2°	2 St.
2 – 4c, 5b, 7, 8	50 621 94	Montageset	Sturz 4°	2 St.
2 – 4d, 5c, 7, 8	50 621 97	Montageset	Sturz 7°	2 St.
2	50 621 02	Halbschale 6,5		6 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991		4 St.
4a	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	Sturz 0°	4 St.
4b	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	Sturz 2°	4 St.
4c	01 120 19	Senkschraube M6x55- DIN 7991	Sturz 4°	4 St.
4d	01 120 21	Senkschraube M6x65 - DIN 7991	Sturz 7°	4 St.
zu 5	-	ohne Scheibe	Sturz 0°	--
5a	01 322 02	Scheibe 6,4 x 3 – DIN 7349	Sturz 2°	4 St.
5b	50 621 06	Distanzblock 12mm	Sturz 4°	2 St.
5c	50 621 07	Distanzblock 22mm	Sturz 7°	2 St.
zu 6	--	ohne Scheibe	Sturz 0°, 4°, 7°	4 St.
6	01 321 02	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021	Sturz 2°	4 St.
7	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125		4 St.
8	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985		4 St.

**Lochplatte für Einhandantrieb mit Trommelbremse
(innen montiert)**

2° Sturz

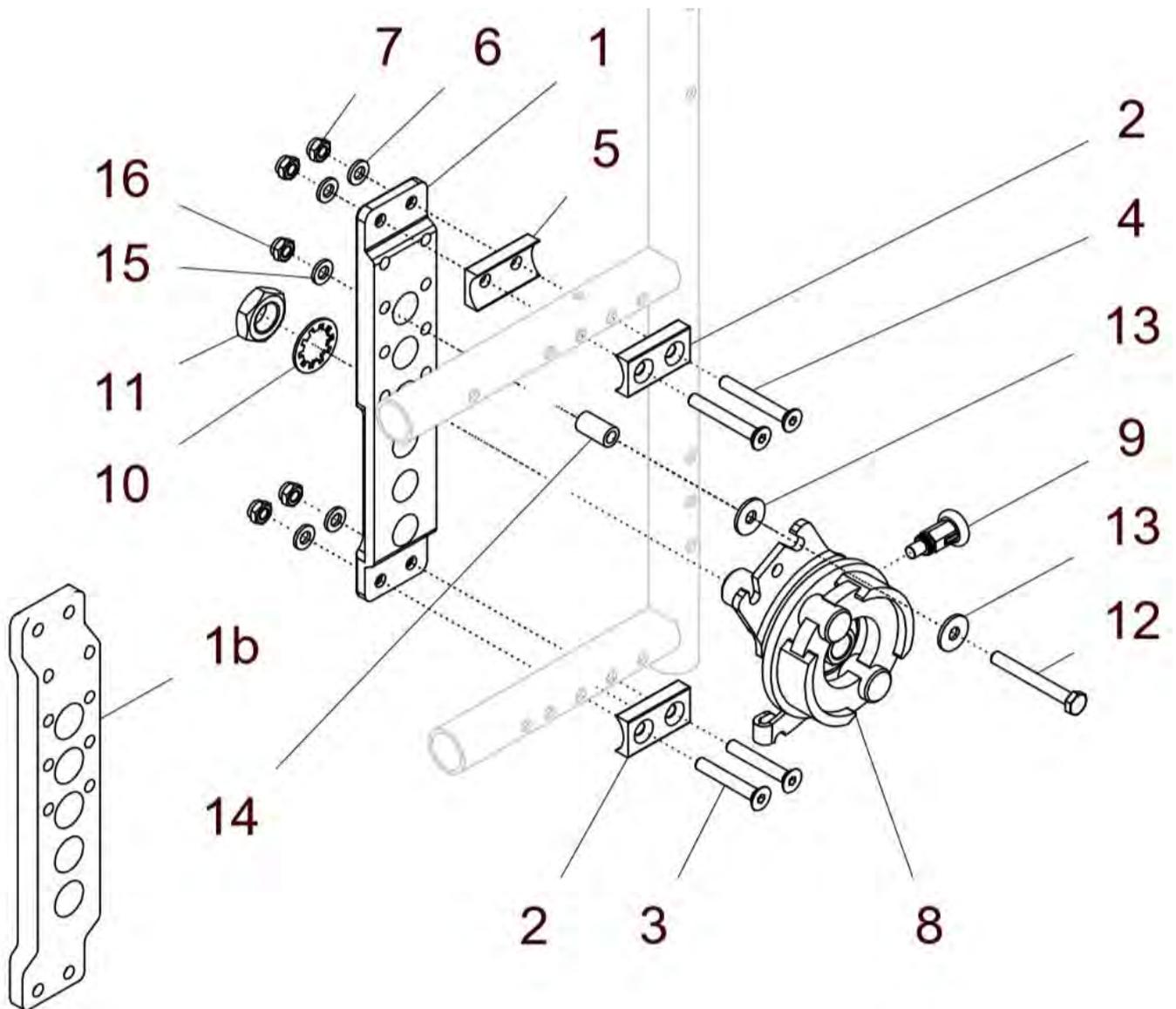

Lochplatte gerade (innen montiert):


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	50 671 50	Lochplatte gerade für EHA innen montiert kpl. Lochplatte gerade für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	2 St.
1a	50 671 01	Lochplatte gerade für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 03	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
8a – 16	50 676 20	Bremsträger-Trommelbremse rechts für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	1 St.
8b – 16	50 676 30	Bremsträger-Trommelbremse links für Einhandantrieb kpl. mit Rastbolzen und Befestigung (ohne Lochplatte)	1 St.
8a	05 144 12	Bremsträger rechts Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-B (rechts)	1 St.
8b	05 144 13	Bremsträger links Trommelbremse Einhandantrieb SIDE-A (links)	1 St.
9	50 671 13	Rastbolzen für Einschraubadapter (M10x1 / d. 6mm)	2 St.
10	01 330 07	Schnorr-Sicherungsscheibe NM18 zn	2 St.
11	50 671 12	Mutter M18x1 für Einschraubadapter	2 St.
12	01 153 27	Linsenkopfschraube M6x45 - ISO 7380 vz	2 St.
13	01 321 03	Scheibe 6,4 groß - DIN 9021 A2	4 St.
14	50 661 16	Distanzröllchen 18mm schwarz	2 St.
15	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
16	01 210 03	Mutter M6 - DIN 985	2 St.

Lochplatte tief (innen montiert):

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a – 7	50 671 55	Lochplatte tief für EHA innen montiert kpl. Lochplatte tief für Einhandantrieb mit Halbschalen, Distanzen und Schrauben (ohne Einschraubadapter EHA) Sturz: 0° / 2°	2 St.
1a	50 671 06	Lochplatte tief für Einhandantrieb (mit Bohrung Ø18)	2 St.
2 – 7	22 621 90	Montageset LP innen Sturz 0° / 2°	2 St.
2	50 621 03	Halbschale 6,5 für Lochplatte innen montiert	4 St.
3	01 120 16	Senkschraube M6x40 - DIN 7991	4 St.
4	01 120 17	Senkschraube M6x45 - DIN 7991	4 St.
5	50 621 02	Halbschale 6,5	2 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125	8 St.
7	01 210 33	Mutter M6 - DIN985	8 St.

Lenkrad mit Schraubachse LRA M8 SLADE /Little (schwarz eloxiert)

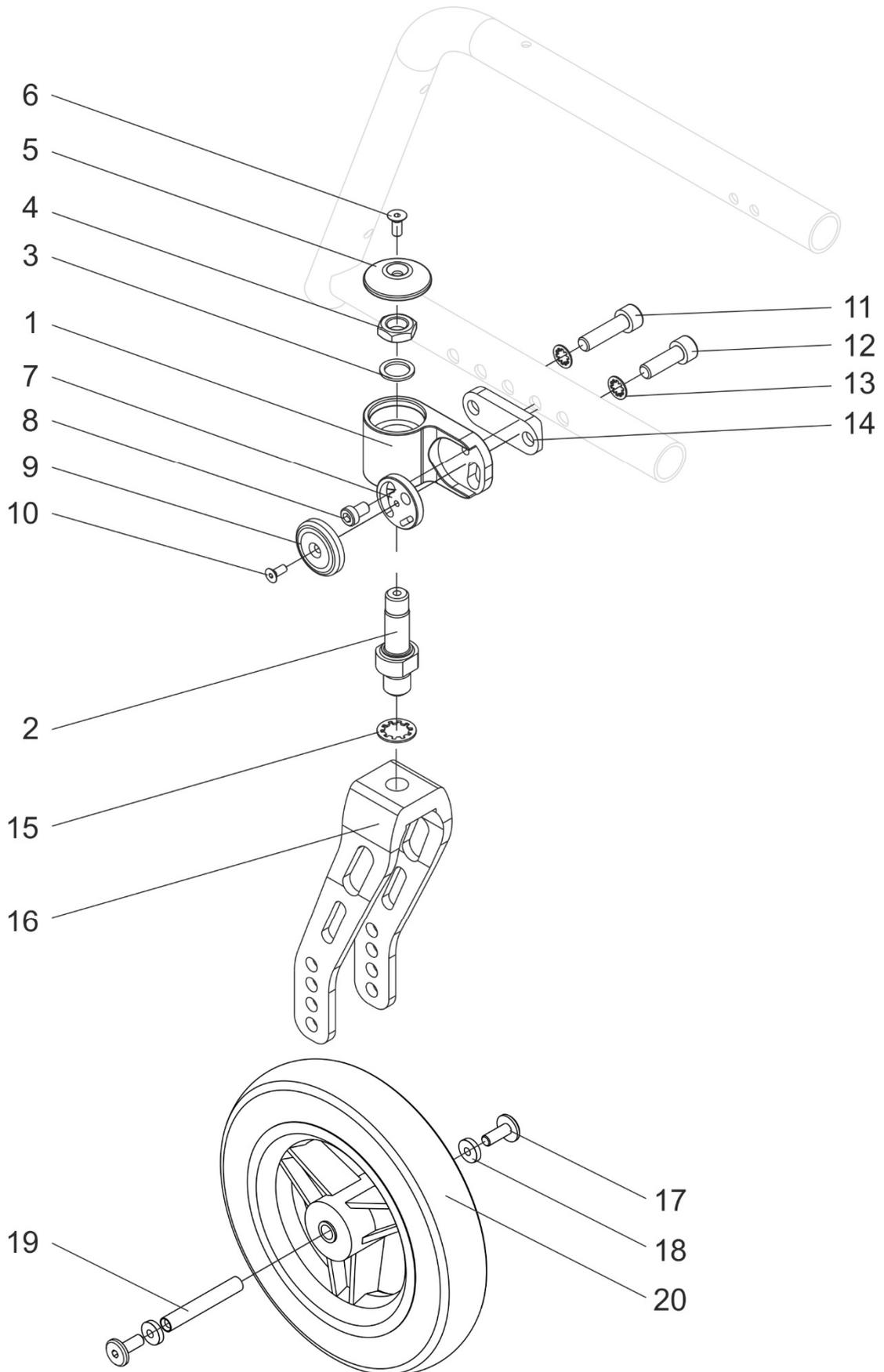


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	45 641 60	Lenkradsatz 4"/ 5"/ 6" Design-Lenkradgabel 39x132 kpl. Design-Lenkradgabel kurz (39x132) mit Lenkrad Und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? Halbschale 55 / M8: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1 - 20	45 641 70	Lenkradsatz 4"/ 5"/ 6" Design-Lenkradgabel 39x170 kpl. Design-Lenkradgabel lang (39x170) mit Lenkrad und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? Halbschale 55 / M8: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1 - 20	45 641 80	Lenkradsatz 140mm Design-Lenkradgabel 45x145 kpl. Design-Lenkradgabel breit (45x145) mit Lenkrad 140mm und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? (140mm grau oder 140mm schwarz) Halbschale 55 / M8: ? FM: schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1a - 15	45 642 25	Lenkradadapter M8 rechts Deckel und Halbschale kpl. mit Exzenter Scheibe und Exzenterdeckel und Schrauben Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1b - 15	45 642 35	Lenkradadapter M8 links Deckel und Halbschale kpl. mit Exzenter Scheibe und Exzenterdeckel und Schrauben Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1a - 4	45 642 20V	Lenkradadapter M8 rechts mit Schraubachse kpl. und Schnorr-Sicherung NM12 mit Mutter M12x1,5	1 St.
1b - 4	45 642 30V	Lenkradadapter M8 links mit Schraubachse kpl. und Schnorr-Sicherung NM12 mit Mutter M12x1,5	1 St.
1a	45 642 20	Lenkradadapter M8 mit Lager rechts (schwarz)	1 St.
1b	45 642 30	Lenkradadapter M8 mit Lager links (schwarz)	1 St.
2	29 642 22	Schraubachse Snoophi	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherung NM12	2 St.
4	01 211 76	Sechskantmutter DIN 439 M12x1,5	2 St.
5	45 642 42	Deckel für Lenkradadapter (schwarz)	2 St.
6	01 120 82D	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 zns schwarz	2 St.
7	45 642 12	Exzenter Scheibe	2 St.
8	01 161 22	Zylinderkopfschraube DIN 6912 M6x10	2 St.

9	45 642 11	Abdeckkappe für Exzenter (schwarz)		2 St.
10	01 120 81	Senkschraube DIN 7991 M4x10		2 St.
11a	01 160 43	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x25	(Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
11b	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30	(Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
11c	01 160 46	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x40	(Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
11d	01 160 47A	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x50	(Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
12a	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30	(Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
12b	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35	(Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
12c	01 160 47	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x45	(Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
12d	01 160 47B	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x55	(Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
13	01 330 02	Schnorr-Sicherung NM8		4 St.
14a	45 642 13	Halbschale 55 / M8 3mm	(Verwendung bei 0° Sturz)	2 St.
14b	45 642 14	Halbschale 55 / M8 8mm	(Verwendung bei 2° Sturz)	2 St.
14c	45 642 15	Halbschale 55 / M8 18mm	(Verwendung bei 4° Sturz)	2 St.
14d	45 642 16	Halbschale 55 / M8 28mm	(Verwendung bei 7-10° Sturz)	2 St.
15	01 330 05	Schnorr-Sicherung NM14		2 St.
16a	40 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, schwarz	(für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
16b	40 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, schwarz	(für Lenkrad 4", 5" oder 6")	2 St.
16c	40 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, schwarz	(für Lenkrad 140mm)	2 St.
17	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz		4 St.
18a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	(bei Lenkrad 4" Vollgummi)	4 St.
18b	--	ohne Scheibe	(bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi)	--
18c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5 für Lenkrad	(bei Skater und LED 4" und 5")	4 St.
18d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm	(bei Lenkrad Alu-Soft 4" und 5" oder 6")	4 St.
18e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm	(bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	4 St.
19a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm	(für Lenkradgabel 39x132/170)	2 St.
19b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm	(für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
20a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi		2 St.
20b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi		2 St.
20c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi		2 St.
20d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift		2 St.
20ef	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz		2 St.
20f	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz		2 St.
20g	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz		2 St.

20h	05 201 65	Lenkrad 4" Skater mit LED	2 St.
20i	05 203 14	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20j	05 203 64	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20k	05 201 43	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
20l	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
20m	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
20n	05 203 15	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20o	05 203 65	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20p	05 201 66	Lenkrad 5" Skater mit LED	2 St.
20q	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
20r	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.

Lenkrad mit Schraubachse LRA M8 SLADE / Little (farbig beschichtet)

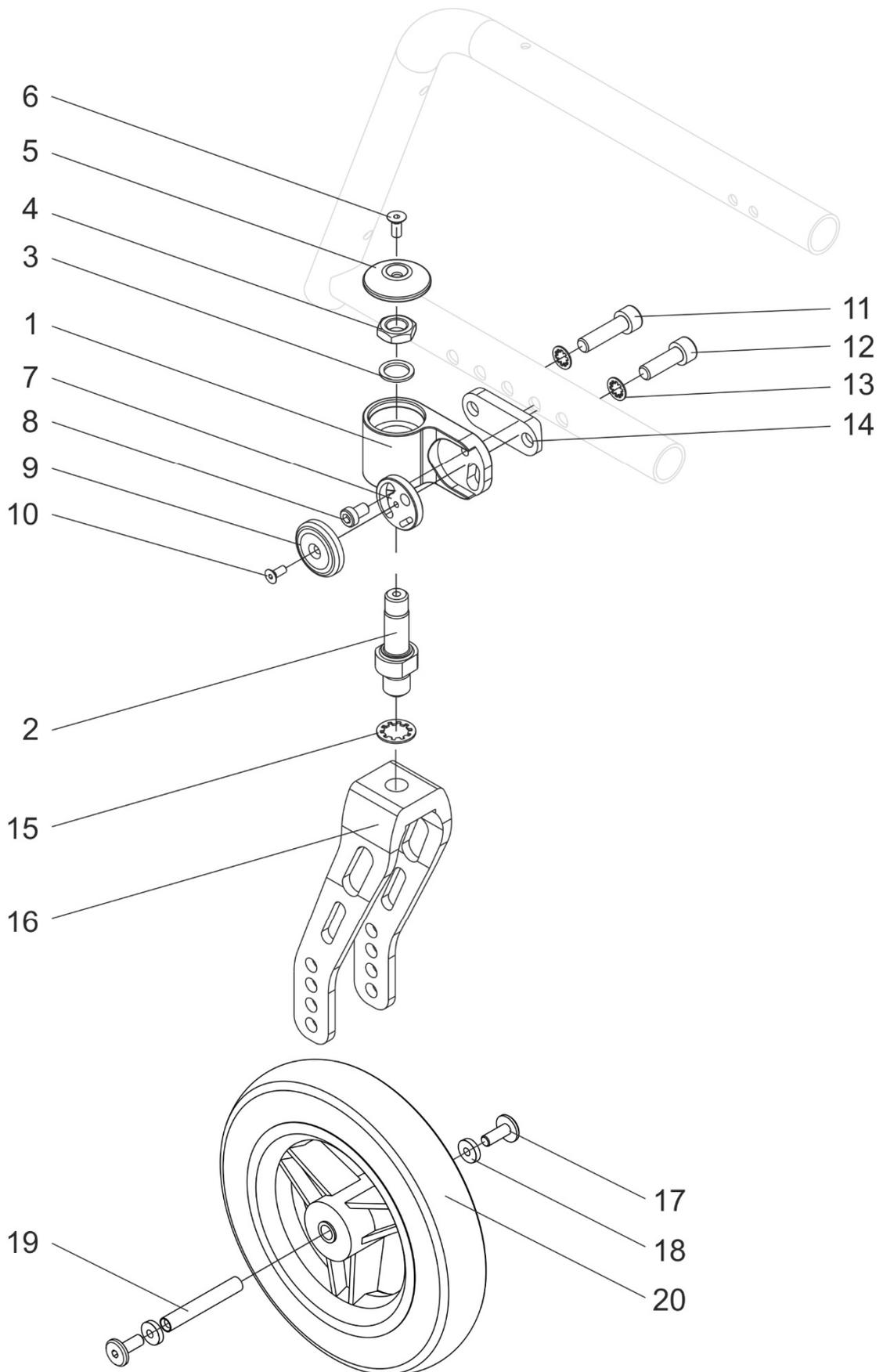


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	45 641 65	Lenkradsatz 4"/ 5"/ 6" Design-Lenkradgabel 39x132 farbig kpl. Design-Lenkradgabel kurz (39x132) mit Lenkrad Und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? Halbschale 55 / M8: ? FM: ? (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1 - 20	45 641 75	Lenkradsatz 4"/ 5"/ 6" Design-Lenkradgabel 39x170 farbig kpl. Design-Lenkradgabel lang (39x170) mit Lenkrad und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? Halbschale 55 / M8: ? FM:) (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1 - 20	45 641 85	Lenkradsatz 140mm Design-Lenkradgabel 45x145 farbig kpl. Design-Lenkradgabel breit (45x145) mit Lenkrad 140mm und Schraubachse LRA M8 mit Befestigung Lenkrad: ? (140mm grau oder 140mm schwarz) Halbschale 55 / M8: ? FM: ? (Lenkradadapter, Lagerdeckel, Exzenterdeckel und Lenkradgabel)	1 Paar
1a - 15	45 642 25F	Lenkradadapter M8 rechts Deckel und Halbschale kpl. mit Exzenterscheibe und Exzenterdeckel und Schrauben FM: ? (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1b - 15	45 642 35F	Lenkradadapter M8 links Deckel und Halbschale kpl. mit Exzenterscheibe und Exzenterdeckel und Schrauben FM: ? (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1a - 4	45 642 20W	Lenkradadapter M8 rechts farbig mit Schraubachse kpl. und Schnorr-Sicherung NM12 mit Mutter M12x1,5 FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
1b - 4	45 642 30W	Lenkradadapter M8 links mit Schraubachse kpl. und Schnorr-Sicherung NM12 mit Mutter M12x1,5 FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
1a	45 642 20F	Lenkradadapter M8 mit Lager rechts FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
1b	45 642 30F	Lenkradadapter M8 mit Lager links FM: ? (Lenkradadapter)	1 St.
2	29 642 22	Schraubachse Snoophi	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherung NM12	2 St.
4	01 211 76	Sechskantmutter DIN 439 M12x1,5	2 St.
5	45 642 42F	Deckel für Lenkradadapter FM: ?	2 St.

6	01 120 82D	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 zns schwarz	2 St.
7	45 642 12	Exzentrerscheibe	2 St.
8	01 161 22	Zylinderkopfschraube DIN 6912 M6x10	2 St.
9	45 642 11F	Abdeckkappe für Exzenter FM: ?	2 St.
10	01 120 81	Senkschraube DIN 7991 M4x10	2 St.
11a	01 160 43	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x25 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
11b	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
11c	01 160 46	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x40 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
11d	01 160 47A	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x50 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
12a	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
12b	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
12c	01 160 47	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x45 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
12d	01 160 47B	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x55 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
13	01 330 02	Schnorr-Sicherung NM8	4 St.
14a	45 642 13	Halbschale 55 / M8 3mm (Verwendung bei 0° Sturz)	2 St.
14b	45 642 14	Halbschale 55 / M8 8mm (Verwendung bei 2° Sturz)	2 St.
14c	45 642 15	Halbschale 55 / M8 18mm (Verwendung bei 4° Sturz)	2 St.
14d	45 642 16	Halbschale 55 / M8 28mm (Verwendung bei 7-10° Sturz)	2 St.
15	01 330 05	Schnorr-Sicherung NM14	2 St.
16a	45 642 01	Design-Lenkradgabel 39x132, farbig (für Lenkrad 4", 5" oder 6") FM: ?	2 St.
16b	45 642 02	Design-Lenkradgabel 39x170, farbig (für Lenkrad 4", 5" oder 6") FM: ?	2 St.
16c	45 648 01	Design-Lenkradgabel 45x145, farbig (für Lenkrad 140mm) FM: ?	2 St.
17	01 193 16	Innensechskantschraube Flach M6x16 schwarz	4 St.
18a	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2 (bei Lenkrad 4" Vollgummi)	4 St.
18b	--	ohne Scheibe (bei Lenkrad 5" und 6" Vollgummi / 140mm Vollgummi)	--
18c	50 642 01	Distanzbuchse 7,5 für Lenkrad (bei Skater und LED 4" und 5")	4 St.
18d	50 642 04	Distanzbuchse 6mm (bei Lenkrad Alu-Soft 4" und 5" oder 6")	4 St.
18e	50 642 03	Distanzbuchse 9,5mm (bei Lenkrad Alu-SOFT 6" in Gabel 45mm)	4 St.
19a	50 642 02	Distanzbuchse 47,5mm (für Lenkradgabel 39x132/170)	2 St.
19b	40 648 02	Distanzbuchse 52,5mm (für Lenkradgabel 45x145)	2 St.
20a	05 201 01	Lenkrad 4" Vollgummi	2 St.
20b	05 201 04	Lenkrad 5" Vollgummi	2 St.
20c	05 201 02	Lenkrad 6" Vollgummi	2 St.

20d	05 202 01	Lenkrad 6" Luftbereift	2 St.
20ef	05 201 43	Lenkrad 4" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
20f	05 201 41	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
20g	05 201 45	Lenkrad 4" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
20h	05 201 65	Lenkrad 4" Skater mit LED	2 St.
20i	05 203 14	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20j	05 203 64	Lenkrad Soft 4" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20k	05 201 43	Lenkrad 5" Vollgummi, Kunststofffelge und Bereifung schwarz	2 St.
20l	05 201 42	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge silber und Bereifung schwarz	2 St.
20m	05 201 46	Lenkrad 5" Vollgummi, ALU-Felge schwarz und Bereifung schwarz	2 St.
20n	05 203 15	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge silber und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20o	05 203 65	Lenkrad Soft 5" mit Alufelge schwarz und Soft-Bereifung schwarz	2 St.
20p	05 201 66	Lenkrad 5" Skater mit LED	2 St.
20q	05 201 11	Lenkrad 140mm Vollgummi grau	2 St.
20r	05 201 13	Lenkrad 140mm Vollgummi schwarz	2 St.


Lenkradadapter mit Feststeller (Arretierbolzen)

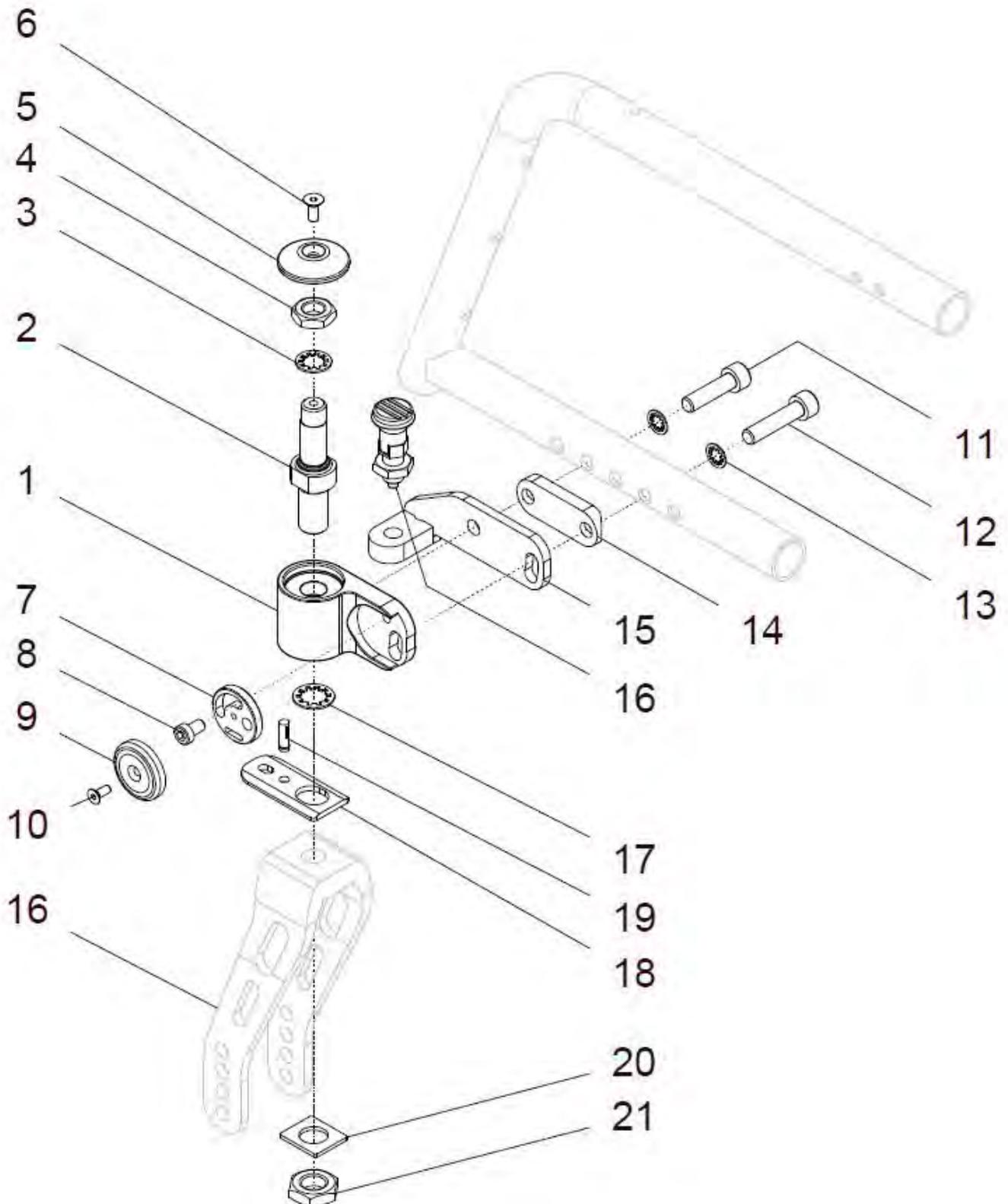

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 21	45 645 00	Lenkradadapter M8 mit Lenkrad-Feststeller kpl. Lenkradadapter M8 mit Exzentrerscheibe und Exzenterdeckel, mit Lenkradfeststeller und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 Paar
1a – 21	45 645 02	Lenkradadapter M8 rechts mit Lenkrad-Feststeller kpl. Lenkradadapter M8 rechts mit Exzentrerscheibe und Exzenterdeckel, mit Lenkradfeststeller und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1b – 21	45 645 03	Lenkradadapter M8 links mit Lenkrad-Feststeller kpl. Lenkradadapter M8 links mit Exzentrerscheibe und Exzenterdeckel, mit Lenkradfeststeller und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1a	45 642 20	Lenkradadapter M8 mit Lager rechts (schwarz)	1 St.
1b	45 642 30	Lenkradadapter M8 mit Lager links (schwarz)	1 St.
2	45 645 11	Schraubachse M12x1,5 (74mm lang)	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherung NM12	2 St.
4	01 211 76	Sechskantmutter DIN 439 M12x1,5	2 St.
5	45 642 42	Deckel für Lenkradadapter (schwarz)	2 St.
6	01 120 82D	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 zns schwarz	2 St.
7	45 642 12	Exzentrerscheibe	2 St.
8	01 161 22	Zylinderkopfschraube DIN 6912 M6x10	2 St.
9	45 642 11	Abdeckkappe für Exzenter (schwarz)	2 St.
10	01 120 81	Senkschraube DIN 7991 M4x10	2 St.
11a	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
11b	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
11c	01 160 47	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x45 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
11d	01 160 47B	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x55 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
11e	01 160 47D	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x65 (Verwendung bei Halbschale 38m)	2 St.
12a	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
12b	01 160 46	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x40 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
12c	01 160 47A	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x50 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
12d	01 160 47C	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x60 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
12e	01 160 47E	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x70 (Verwendung bei Halbschale 38m)	2 St.

13	01 330 02	Schnorr-Sicherung NM8	4 St.
14a	45 642 13	Halbschale 55 / M8 3mm (Verwendung bei FB mit Klemmlaschen im Rahmen montiert)	2 St.
14b	45 642 14	Halbschale 55 / M8 8mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
14c	45 642 15	Halbschale 55 / M8 18mm (Verwendung bei FB mit Fußbrettbügel)	2 St.
14d	45 642 16	Halbschale 55 / M8 28mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
14e	45 642 17	Halbschale 55 / M8 38mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
15a	45 645 21	Lenkradfeststellerplatte rechts (mit M10x1)	1 St.
15b	45 645 31	Lenkradfeststellerplatte links (mit M10x1)	1 St.
16	01 133 03	Arretierbolzen M10x1 / Ø5 mit Rastnut	2 St.
17	01 330 05	Schnorr-Sicherung NM14	2 St.
18	25 645 51	Arretierplatte mit Fase	2 St.
19	01 411 50	Passkerbstift Ø5x16 - DIN 1472	2 St.
20	50 642 55	Distanzplatte für Lenkradgabel	2 St.
21	01 210 47	Mutter M14 - DIN 936 vz	2 St.

Lenkradadapter mit federndem Druckstück (Geradeauslauf / straight-keeper)

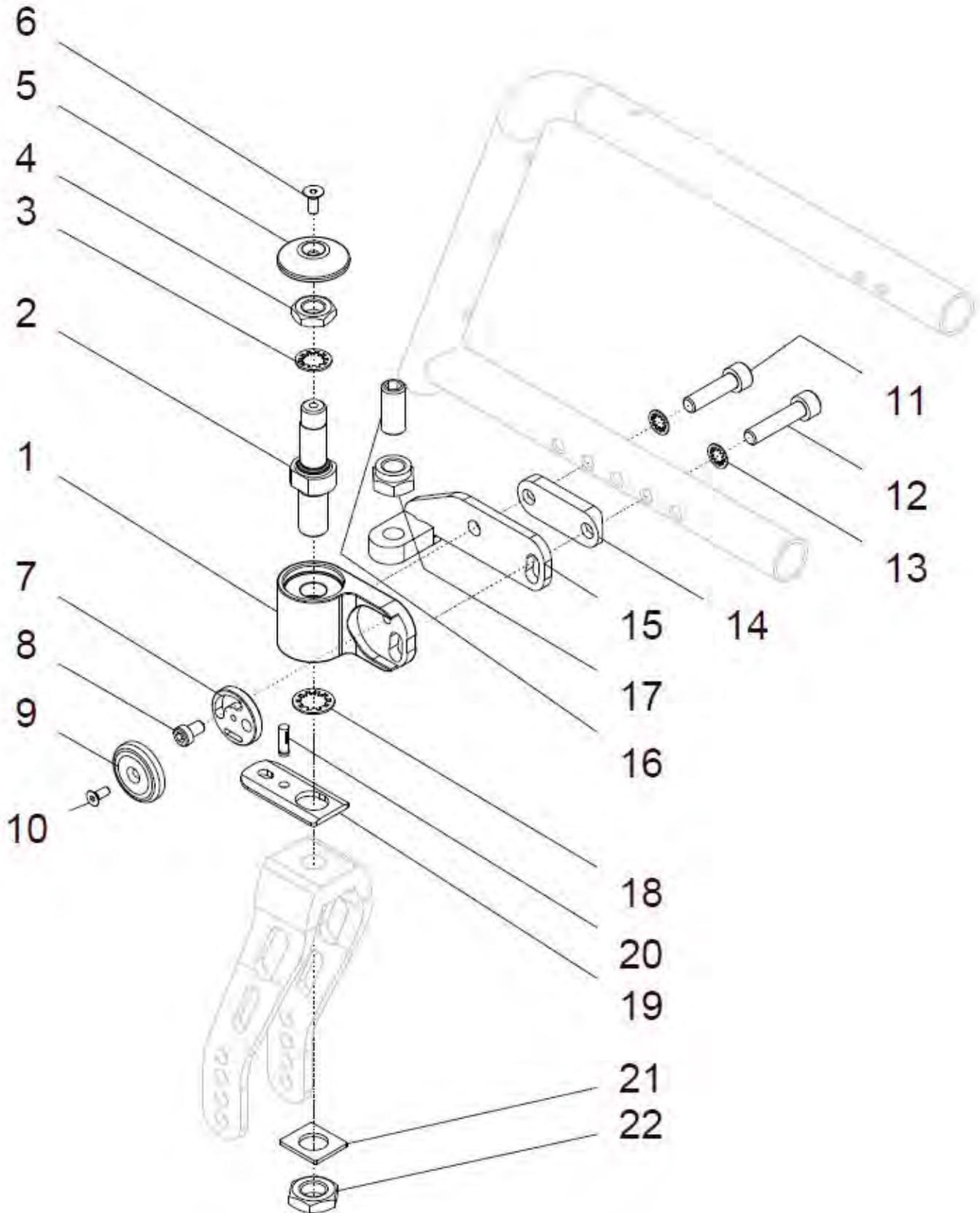


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	45 645 50	Lenkradadapter M8 mit federndem Druckstück kpl. Lenkradadapter M8 mit Exzenter Scheibe und Exzenterdeckel, mit federndem Druckstück (straight-keeper) und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 Paar
1a – 22	45 645 52	Lenkradadapter M8 rechts mit federndem Druckstück kpl. Lenkradadapter M8 rechts mit Exzenter Scheibe und Exzenterdeckel, mit federndem Druckstück (straight-keeper) und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1b – 22	45 645 53	Lenkradadapter M8 links mit federndem Druckstück kpl. Lenkradadapter M8 links mit Exzenter Scheibe und Exzenterdeckel, mit federndem Druckstück (straight-keeper) und mit Schrauben (ohne Lenkrad / ohne Lenkradgabel) Teile schwarz eloxiert (Lenkradadapter, Lagerdeckel und Exzenterdeckel) Halbschale 55 / M8: ?	1 St.
1a	45 642 20	Lenkradadapter M8 mit Lager rechts (schwarz)	1 St.
1b	45 642 30	Lenkradadapter M8 mit Lager links (schwarz)	1 St.
2	45 645 11	Schraubachse M12x1,5 (74mm lang)	2 St.
3	01 330 04	Schnorr-Sicherung NM12	2 St.
4	01 211 76	Sechskantmutter DIN 439 M12x1,5	2 St.
5	45 642 42	Deckel für Lenkradadapter (schwarz)	2 St.
6	01 120 82D	Senkschraube M5x12 - DIN 7991 zns schwarz	2 St.
7	45 642 12	Exzenter Scheibe	2 St.
8	01 161 22	Zylinderkopfschraube DIN 6912 M6x10	2 St.
9	45 642 11	Abdeckkappe für Exzenter (schwarz)	2 St.
10	01 120 81	Senkschraube DIN 7991 M4x10	2 St.
11a	01 160 44	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x30 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
11b	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
11c	01 160 47	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x45 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
11d	01 160 47B	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x55 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
11e	01 160 47D	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x65 (Verwendung bei Halbschale 38m)	2 St.
12a	01 160 45	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x35 (Verwendung bei Halbschale 3m)	2 St.
12b	01 160 46	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x40 (Verwendung bei Halbschale 8m)	2 St.
12c	01 160 47A	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x50 (Verwendung bei Halbschale 18m)	2 St.
12d	01 160 47C	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x60 (Verwendung bei Halbschale 28m)	2 St.
12e	01 160 47E	Zylinderkopfschraube DIN 912 M8x70 (Verwendung bei Halbschale 38m)	2 St.


13	01 330 02	Schnorr-Sicherung NM8	4 St.
14a	45 642 13	Halbschale 55 / M8 3mm (Verwendung bei FB mit Klemmlaschen im Rahmen montiert)	2 St.
14b	45 642 14	Halbschale 55 / M8 8mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
14c	45 642 15	Halbschale 55 / M8 18mm (Verwendung bei FB mit Fußbrettbügel)	2 St.
14d	45 642 16	Halbschale 55 / M8 28mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
14e	45 642 17	Halbschale 55 / M8 38mm (Verwendung als Alternative)	2 St.
15a	45 645 61	Lenkradfeststellerplatte rechts (mit M10x1)	1 St.
15b	45 645 71	Lenkradfeststellerplatte links (mit M10x1)	1 St.
16	01 132 19	Federndes Druckstück M12	2 St.
17	01 210 06	Mutter M12 - DIN 985	2 St.
18	01 330 05	Schnorr-Sicherung NM14	2 St.
19	25 645 51	Arretierplatte mit Fase	2 St.
20	01 411 50	Passkerbstift Ø5x16 - DIN 1472	2 St.
21	50 642 55	Distanzplatte für Lenkradgabel	2 St.
22	01 210 47	Mutter M14 - DIN 936 vz	2 St.

Bremse

Gruppe 7

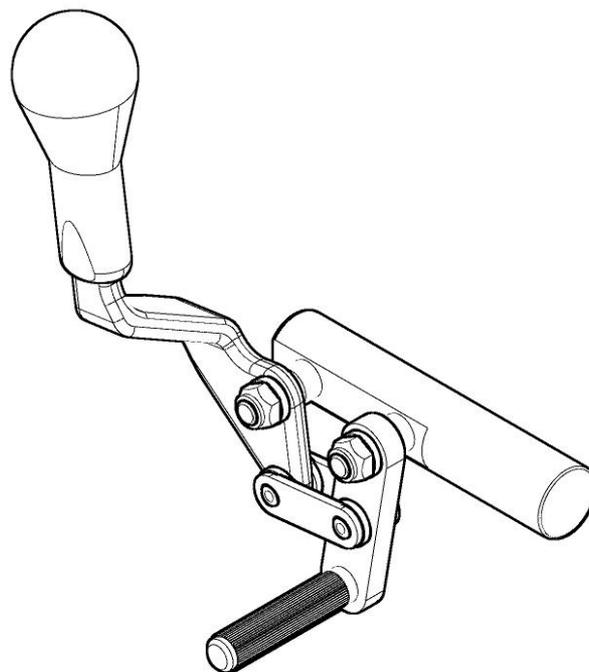


Kniehebelbremse abgekröpft

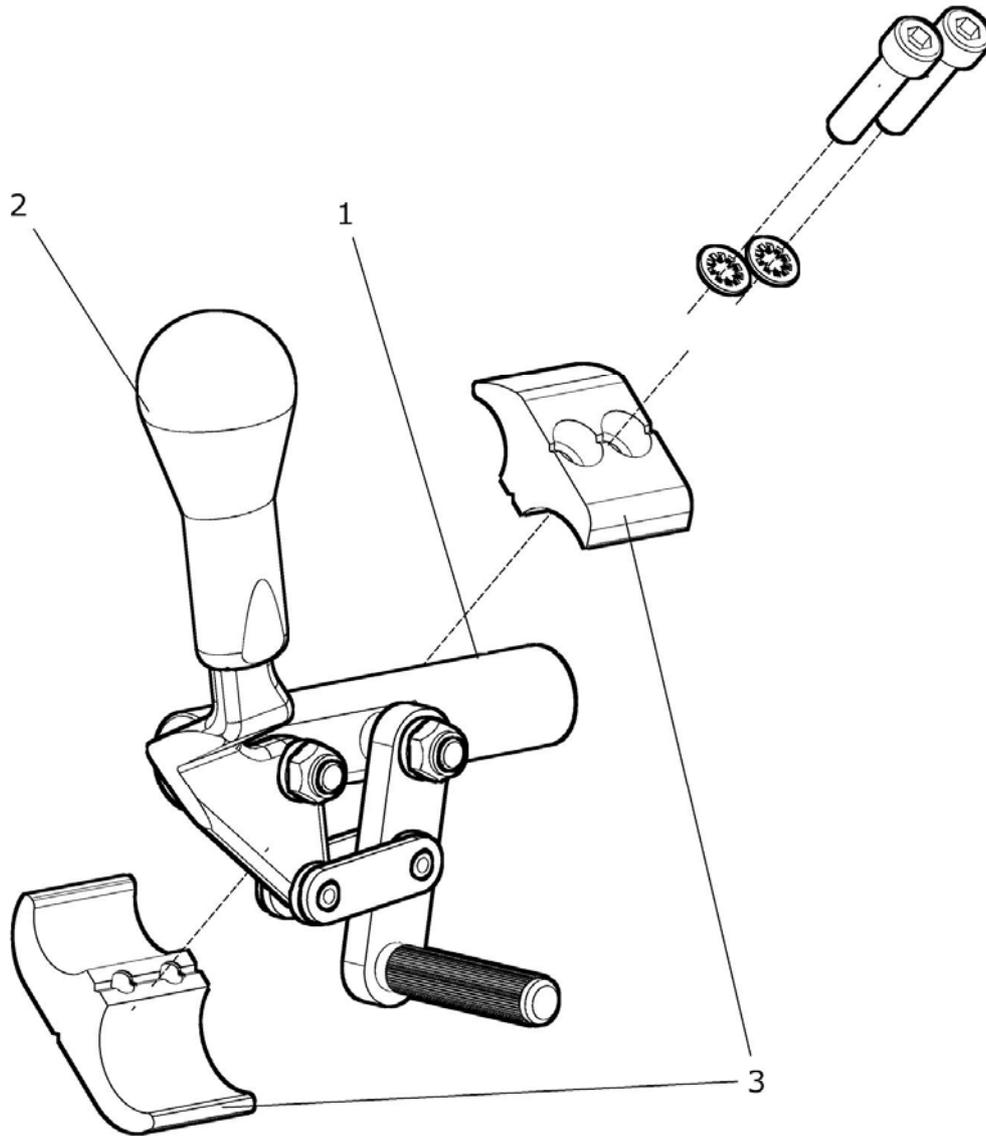


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 3	50 740 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (Paar) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 3	50 742 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (rechts) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 3	50 743 60	Kniehebelbremse kurz abgekröpft (links) kpl. mit Griff und mit Halter (mit kurzem Hebelweg) mit Bremshalter: ?	1 St.
1a – 2	25 722 01	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1b – 2	25 723 01	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links kpl. mit Griff (ohne Halter)	1 St.
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse mit Verlängerung abklappbar

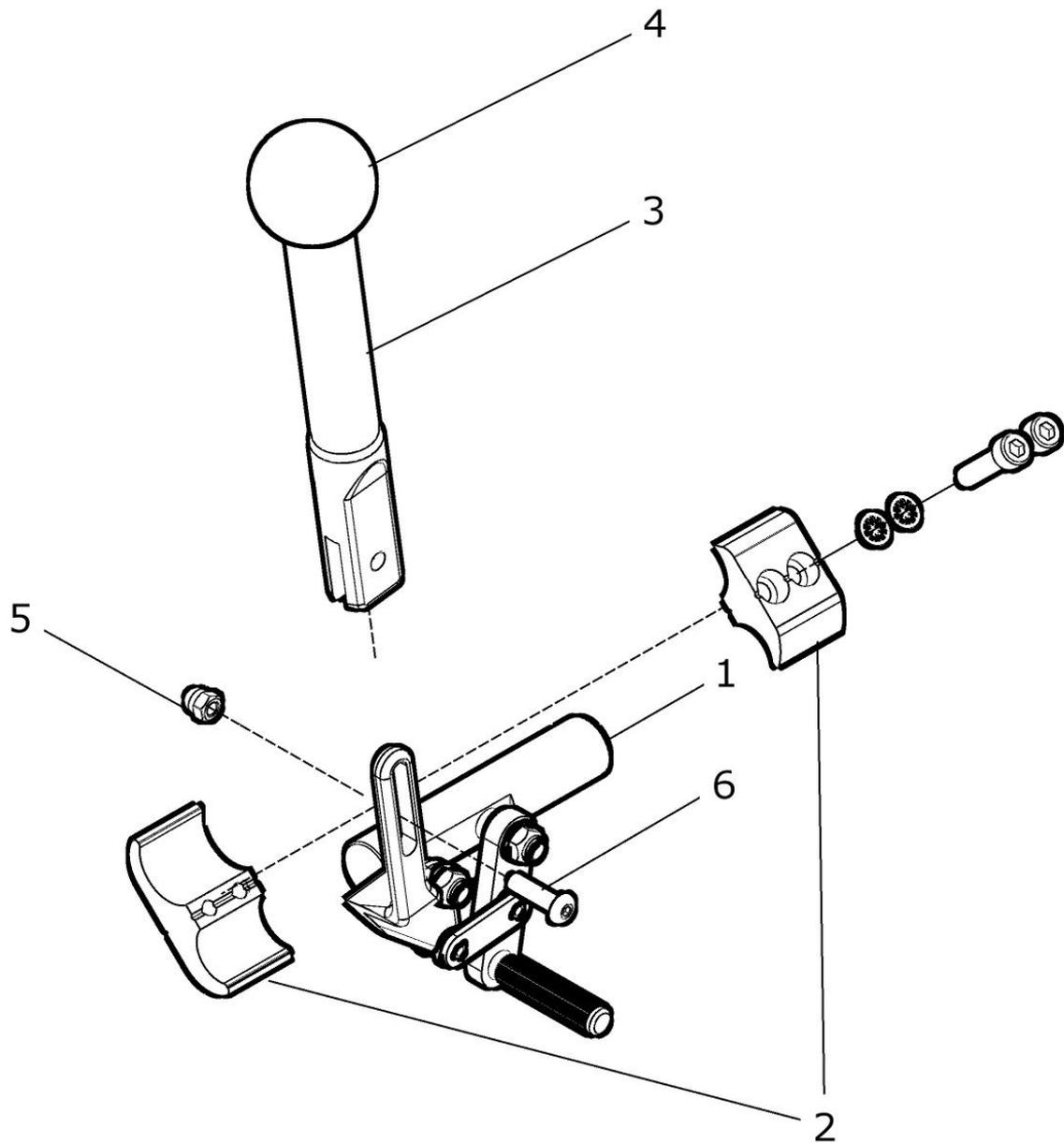


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 6	25 730 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft mit Verlg. abklappb. Paar kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 Paar
1a – 6	25 732 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. rechts kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1b – 6	25 733 00	Kniehebelbremse kurz abgekröpft /+ Verlg. abklapp. links kpl. mit Bremshebelverlängerung abklappbar und mit Halter mit Bremshalter: ?	1 St.
1a	25 722 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft rechts ohne Bremshebelkappe	1 St.
1b	25 723 11	Kniehebelbremse kurz abgekröpft links ohne Bremshebelkappe	1 St.
2a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
2b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
2c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
3 – 6	50 751 00	Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.	2 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	2 St.
4	01 251 21	Kugel	2 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x25 - DIN 7380F schwarz ZNS	2 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	2 St.

Betätigung Trommelbremse (für Begleitperson)

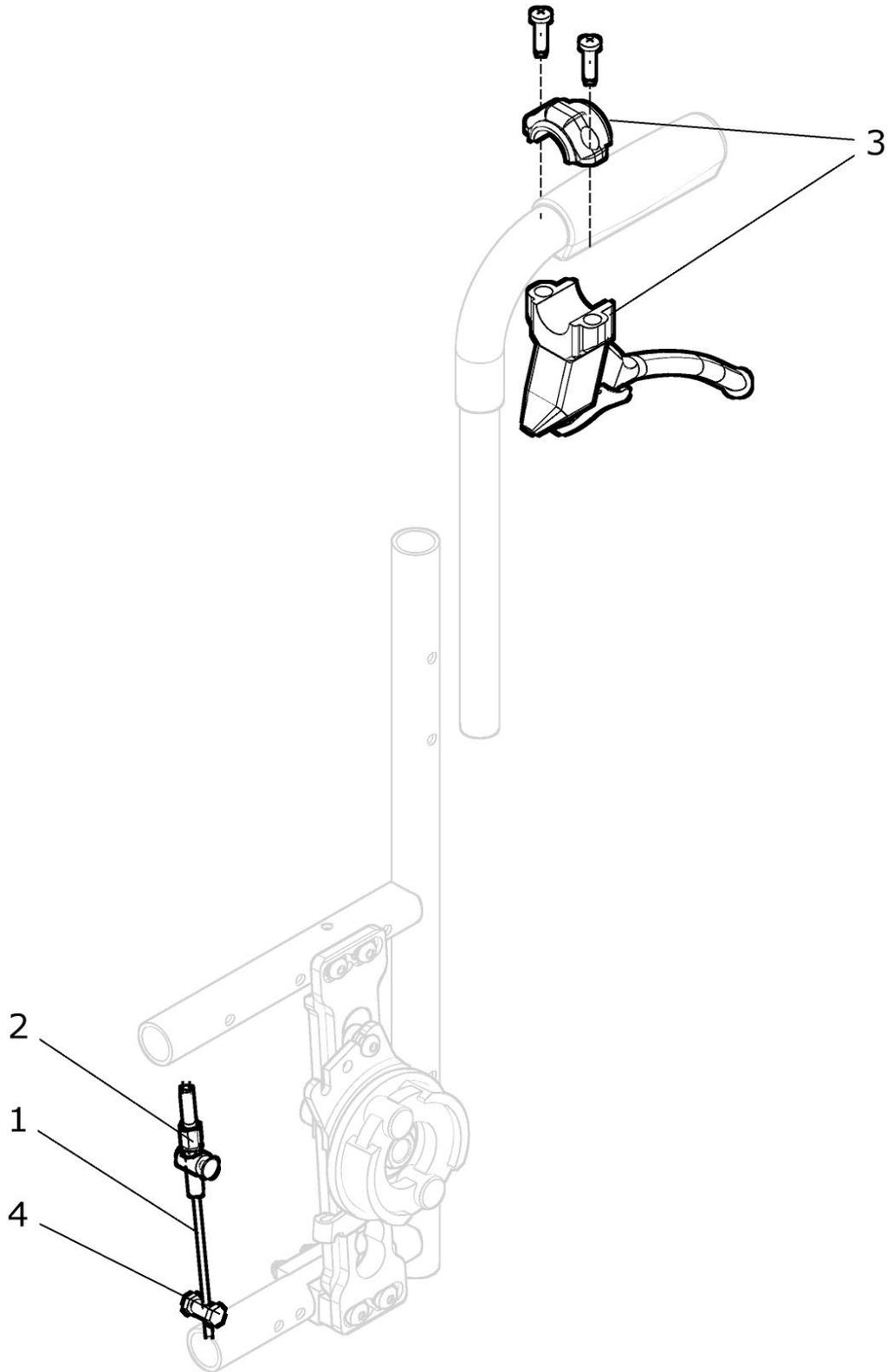



Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	50 730 00	Betätigung für Trommelbremse kpl. Bremsgriff mit Bowdenzug, Einstellautomatik und Klemmnippel RH: ? Schiebegriff höhenverstellbar: ?	2 St.
1a	50 731 01	Bowdenzug 650 / 790 für Trommelbremse (RH 20-35 standard / RH 20 -30 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1b	50 731 11	Bowdenzug 880 / 1020 für Trommelbremse (RH 40 - 55 standard / RH 35 - 50 Schgr. höhenv. 15cm)	2 St.
1c	50 731 21	Bowdenzug 1050/1190 für Trommelbremse (RH 50 - 55 Schgr. höhenv. 15cm und für Schgr. lang / extra lang)	2 St.
2	05 402 00	Einstellautomatik für Bowdenzug kpl.	2 St.
3	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
4	05 402 20	Klemmnippel	2 St.

Einhandbremse

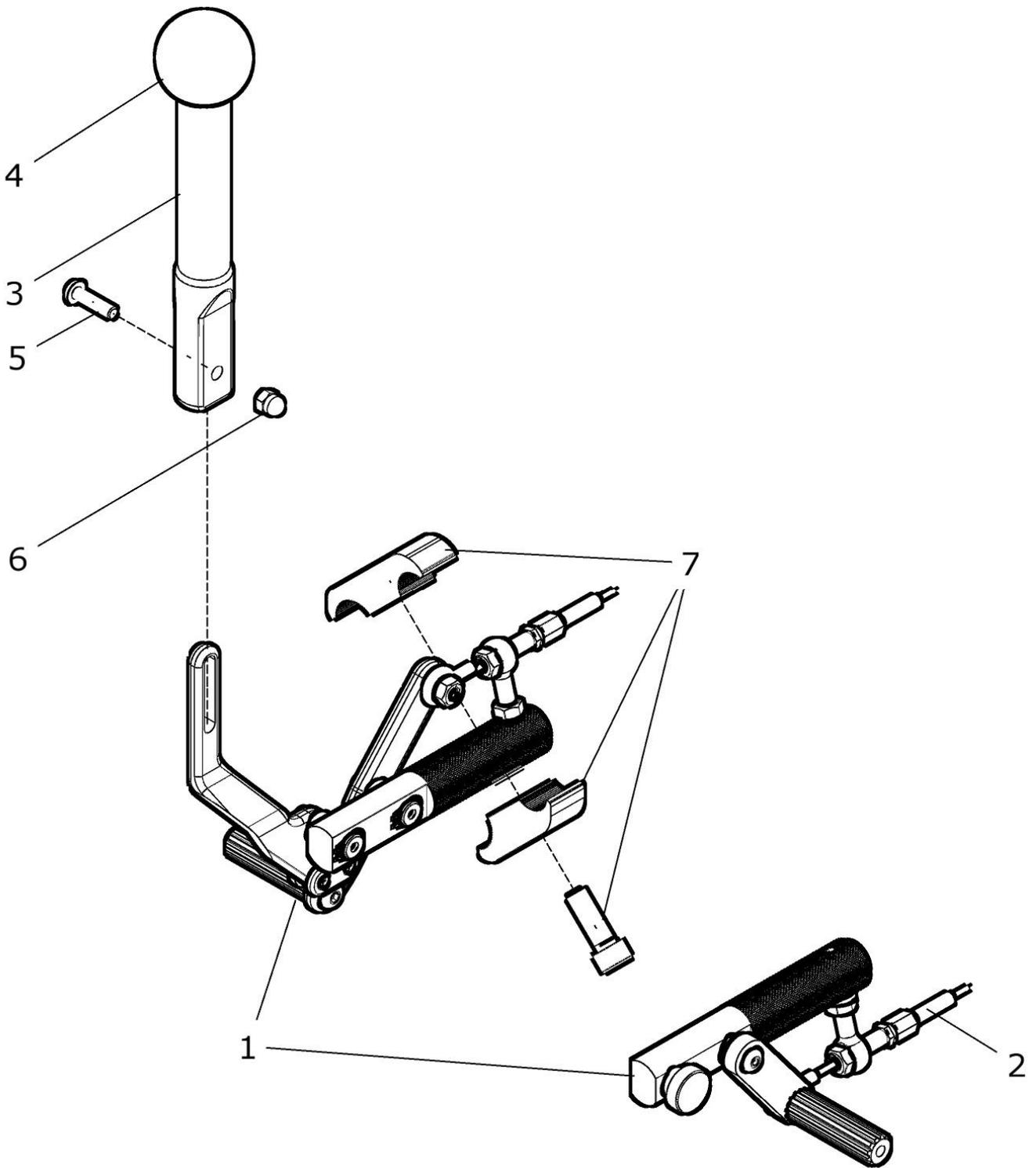


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 7	25 750 20	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1c - 7	25 750 60	Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz rechts betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar rechts (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	1 St.
1a - 2	25 750 21	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt mit Bowdenzug standard	1 St.
1c - 2	25 750 61	Einhand-Kniehebelbremse kurz rechts betätigt (140mm Bolzen) mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	1 St.
2a	50 721 30	Bowdenzug kurz für Einhandbremse (bis SB 50cm) / standard	1 St.
2b	50 721 40	Bowdenzug lang für Einhandbremse (ab SB 52cm)	1 St.
3 - 6	50 751 00	Bremshebelverlängerung abklappbar kpl.	1 St.
3	50 751 01	Bremshebelverlängerung	1 St.
4	01 251 21	Kugel	1 St.
5	01 156 57	Linsenkopfschraube M5x20 - DIN 7380F schwarz ZNS	1 St.
6	01 210 72	Hutmutter M5 - DIN 986 schwarz ZNS	1 St.
7a	50 741 01	Bremshalter kurz kpl. (Typ A)	2 St.
7b	50 741 20	Bremshalter lang kpl. (Typ B)	2 St.
7c	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.
7d	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl. (Typ D) standard	1 Paar
1b - 7	25 750 30	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links Standard-Ausführung mit Bremshalter: ? SB: ?	1 St.
1d - 7	25 750 70	Einhand-Kniehebelbremse 140 kurz links betätigt kpl. abgekröpft mit kurzem Hebelweg mit Bremshebelverlängerung abklappbar links (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht) mit Bremshalter: ? SB: ? (Sonder-Ausführung)	1 St.
1b - 2	25 750 31	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt mit Bowdenzug standard	1 St.
1d - 2	25 750 71	Einhand-Kniehebelbremse kurz links betätigt (140mm Bolzen) mit Bowdenzug standard (mit Befestigungsbolzen lang 140mm / bzw. umgedreht)	1 St.

Montage - Hinweis Einhandbremse

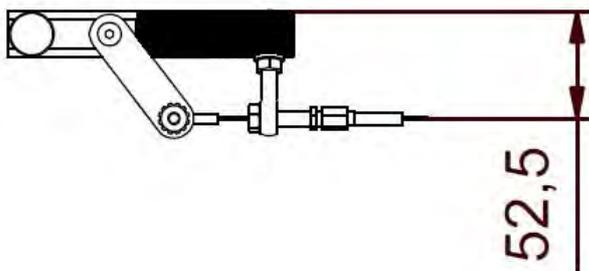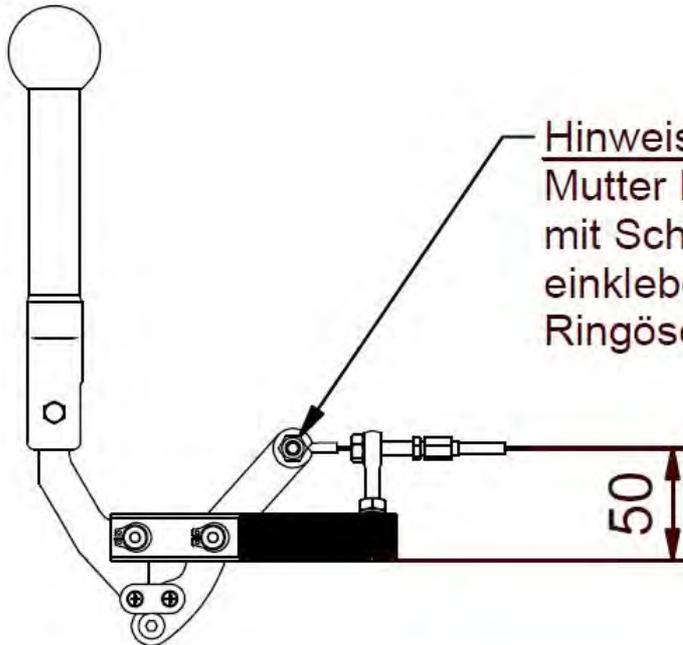


Druckbremse für Begleitperson

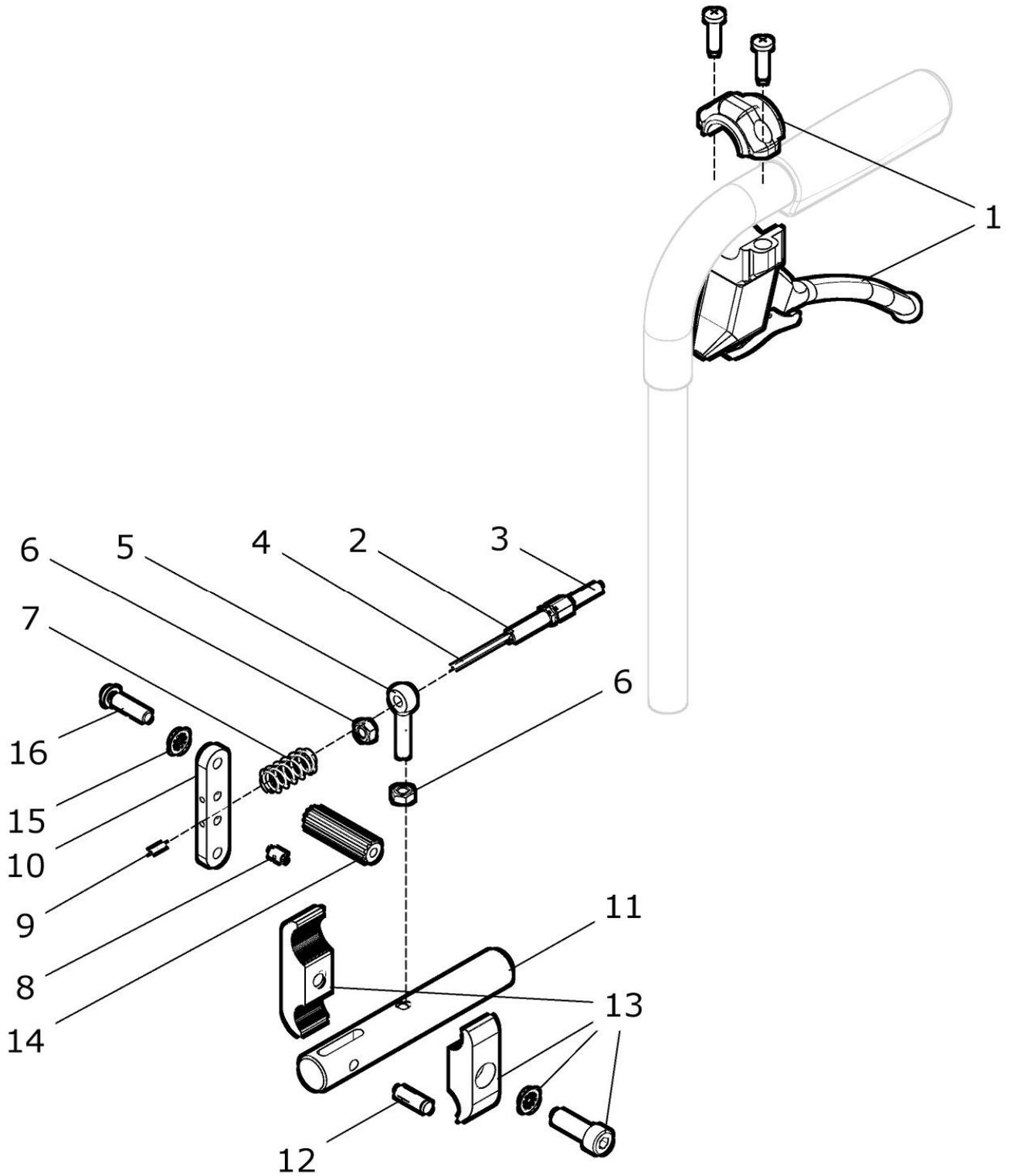

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 16	22 750 00	Druckbremse für Begleitperson kpl. Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 Paar
1 - 16	22 752 00	Druckbremse für Begleitperson rechts kpl. Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten rechts am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 16	22 753 00	Druckbremse für Begleitperson links kpl. Bremsen angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson Druckbremse unten links am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
1 - 9	22 751 00	Bowdenzug Druckbremse mit Bremsgriff Begleitperson kpl. Bowdenzug mit Bremsgriff und mit Einstellautomatik, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1	05 401 01	Bremsgriff für Trommelbremse kpl.	2 St.
2 - 4	22 751 05	Bowdenzug für Druckbremse kpl.	2 St.
2	05 402 02	Einstellschraube M6x34mm mit Mutter M6	2 St.
3	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
5	01 180 02	Augenschraube B M6x25 - DIN 444	2 St.
6	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	4 St.
7	02 110 09	Druckfeder	2 St.
8	05 402 28	S-Nippel	2 St.
9	05 402 72	Adernendhülse L=10mm	2 St.
10 - 16	22 752 10	Druckbremse unten am Rahmen rechts kpl. (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.
10 - 16	22 753 10	Druckbremse unten am Rahmen links kpl. (ohne Bowdenzug / ohne Bremsgriff) Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Gabelbolzen: ? (gerade / abgekröpft / lang) Bremshalter: ? (Typ C / D)	1 St.

10	25 741 32	Stegbolzen		2 St.
11a	25 741 61	Gabelbolzen lang gerade (=standard)	(meistens SPRINT / SLADE)	2 St.
11b	25 741 41	Gabelbolzen 20° abgekröpft 25mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11c	25 741 46	Gabelbolzen 20° abgekröpft 45mm	(meistens FINDUS)	2 St.
11d	25 741 31	Gabelbolzen gerade	(meistens FILOU)	2 St.
12	01 411 72	Knebelkerbstift Ø6x20 - DIN 1475		2 St.
13a	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl.	(Typ C)	2 St.
13b	25 721 00	Bremshalter versetzt kpl.	(Typ D)	1 Paar
14a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)		2 St.
14b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm		2 St.
15	01 330 01	Schnorr-Sicherungsscheibe NM6		2 St.
16	01 152 23	Linsenkopfschraube M6x25 - ISO 7380		2 St.


Kniehebelbremse angesteuert mit Bowdenzug für Begleitperson

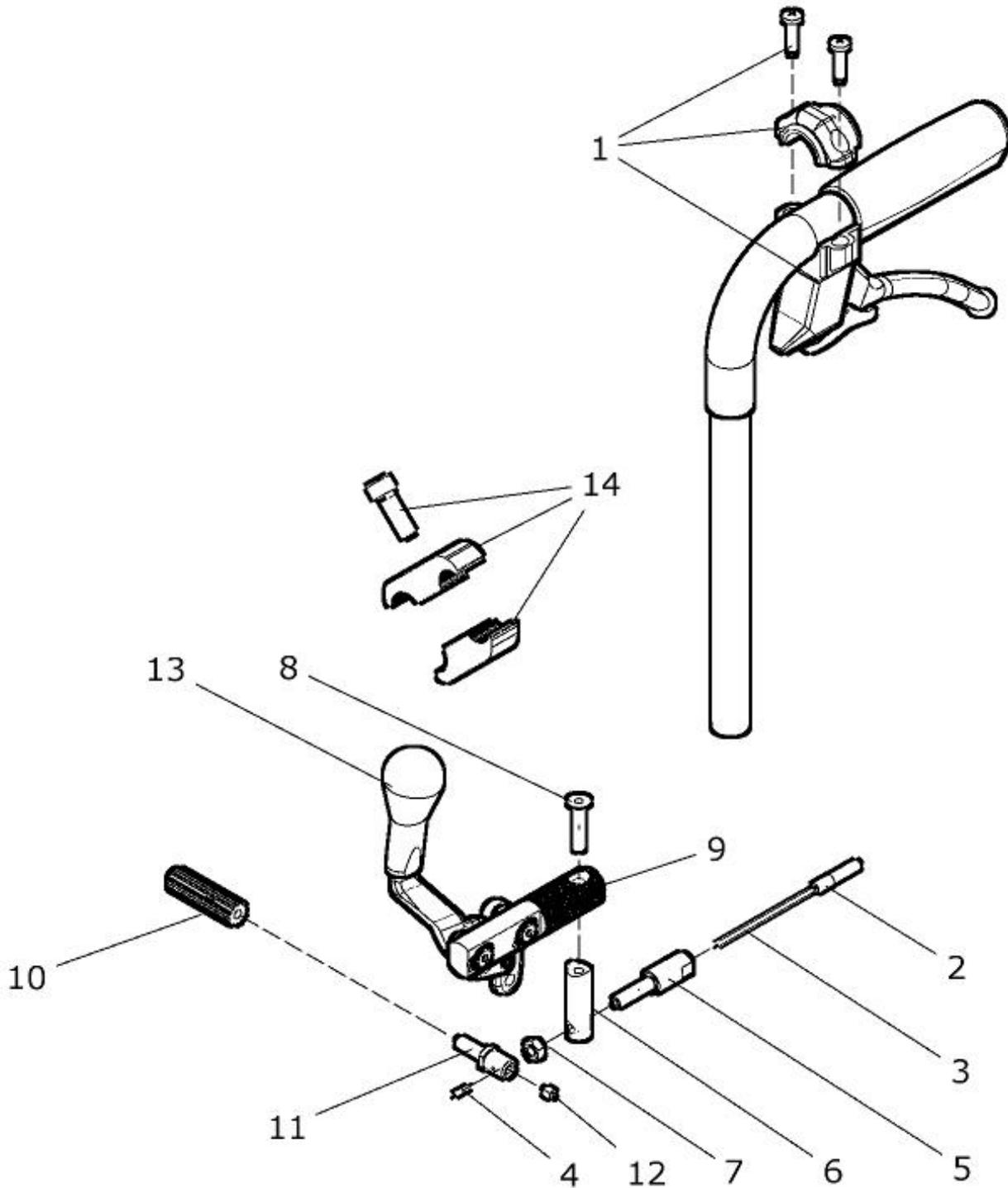

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	22 740 00	Kniehebelbremse abgekr. mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft kurz angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 Paar
1 - 9a, 10 - 14	22 742 00	Kniehebelbremse rechts mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft rechts angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 - 9b, 10 - 14	22 743 00	Kniehebelbremse links mit Bowdenzug für Begleitperson kpl. Kniehebelbremse abgekröpft links angesteuert mit Bowdenzug über Bremsgriff von Begleitperson, Kniehebelbremse am Rahmen montiert Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
1 - 8	22 741 10	Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl. Bowdenzug mit Bremsgriff MAG und mit Gewindehülse, Klemmnippel und Distanzbolzen mit Kontermutter und Gewindebolzen	2 St.
1 - 4	22 741 40	Bremsgriff MAG mit Bowdenzug für Kniehebelbremse	2 St.
1	22 741 45	Bremsgriff MAG mit Gewinde M5	2 St.
2 - 4	22 741 30	Bowdenzug für Kniehebelbremse kpl. Die Bowdenzughülle und der Innenzug wird beim Einbau entsprechend gekürzt	2 St.
2	05 403 59	Bowdenzughülle 1245 lang (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
3	05 403 25	Innenzug (Rundlitze) 1500x1,5 (wird beim Einbau entsprechend gekürzt)	2 St.
4	05 402 72	Aderendhülse L=10mm	2 St.
5	22 741 21	Gewindehülse M6 für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
6	22 741 61	Distanzbolzen für Kniehebelbremse mit Bowdenzug	2 St.
7	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934	2 St.
8	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380	2 St.
9a - 12	22 742 10	Kniehebelbremse kurz rechts mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl. ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9b - 12	22 743 10	Kniehebelbremse kurz links mit Andruckbolzen f. Bw.zug kpl. ohne Bowdenzug und ohne Gewindehülse / Distanzbolzen Andruckbolzen: ? (50mm / 70mm) Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht)	1 St.
9a	22 742 11	Kniehebelbremse kurz rechts für Bowdenzug / ohne Andruckbolzen Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.

9b	22 743 11	Kniehebelbremse kurz links für Bowdenzug Befestigungsbolzen: ? (standard oder umgedreht) Hinweis: bei Befestigungsbolzen umgedreht muss der Befestigungs-/Bremsbolzen lang (25 751 98) eingebaut werden !!!	1 St.
10a	29 711 69	Andruckbolzen mittel 50mm (=standard)	2 St.
10b	29 711 68	Andruckbolzen lang 70mm	2 St.
11	22 751 11	Gewindebolzen M6 / M5	2 St.
12	01 131 01	Gewindestift M5x6 - DIN 913	2 St.
13	04 201 02	Bremshebelkappe	2 St.
14	50 741 60	Bremshalter lang schmal kpl. (Typ C)	2 St.

Kniehebelbremse „ Pull to lock “

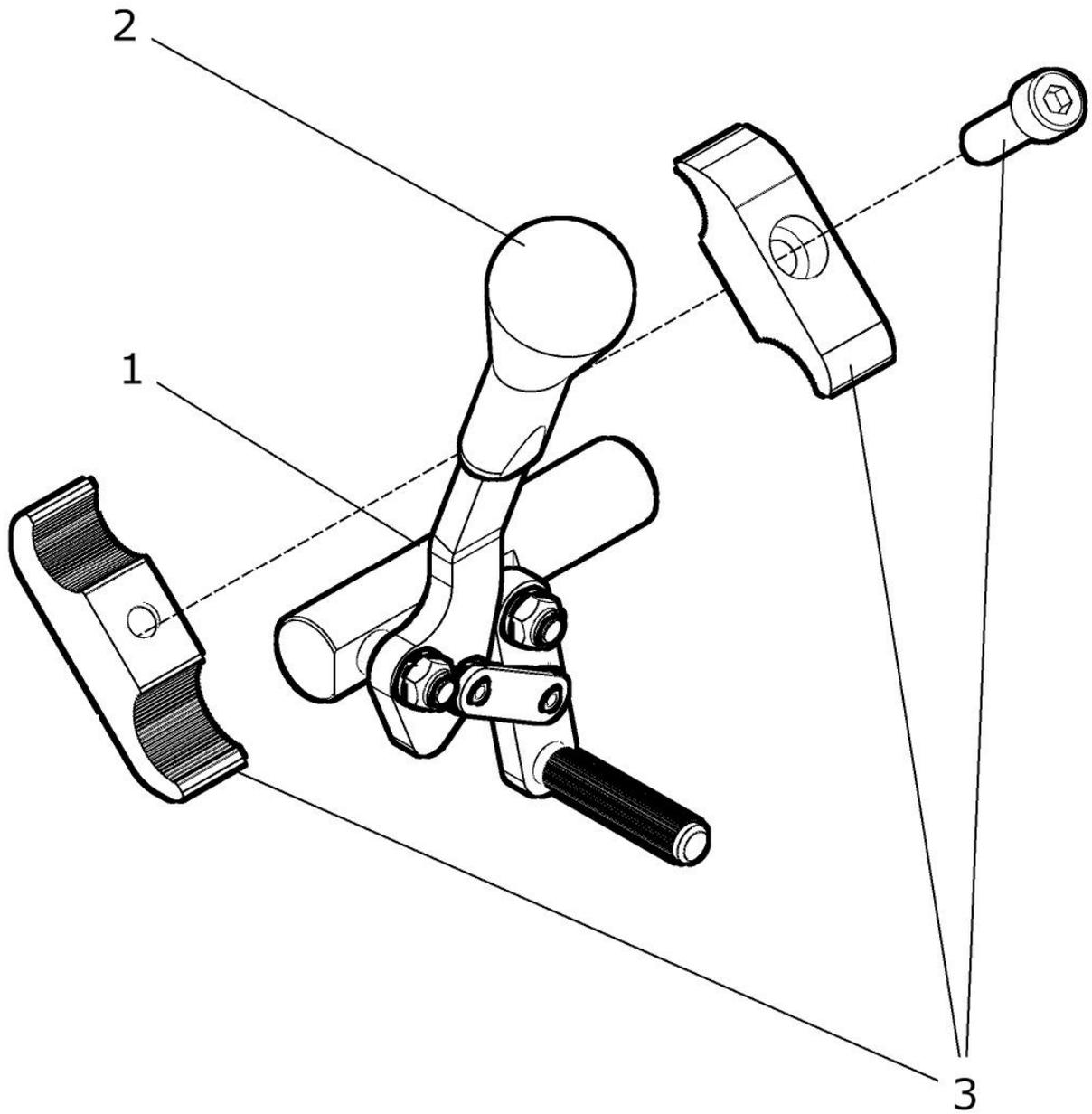

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung			Menge
1 – 3	50 760 00	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	(Paar)	kpl.	1 Paar
1a – 3	50 760 20	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	rechts	kpl.	1 St.
1b – 3	50 760 30	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff und mit Halter mit Bremshalter: ?	links	kpl.	1 St.
1a, 2	50 762 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	rechts		1 St.
1b, 2	50 763 01	Kniehebelbremse „Pull to lock“ mit Griff (ohne Halter)	links		1 St.
2	04 201 03	Bremshebelkappe oval			2 St.
3a	50 741 01	Bremshalter kurz	kpl.	(Typ A)	2 St.
3b	50 741 20	Bremshalter lang	kpl.	(Typ B)	2 St.
3c	50 741 60	Bremshalter lang schmal	kpl.	(Typ C)	2 St.

