

Ersatzteilkatalog

FLOH HB



VD 940 – 04 - 2020

Berollka-aktiv
Rollstuhltechnik GmbH
Jahnstrasse 16
D-74889 Sinsheim

Tel.:07261 – 7351 - 0
Fax:07261 – 7351 - 10
info@berollka.de
www.berollka.de



Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdrucks und der Vervielfältigung des Ersatzteilkatalogs oder Teilen daraus, behalten wir uns vor. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung der Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren), auch nicht zum Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.


© 2020 Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH, D-74889 Sinsheim

Printed in Germany

Ersatzteilkatalog

Untergestell für Sitzschalen

FLOH HB

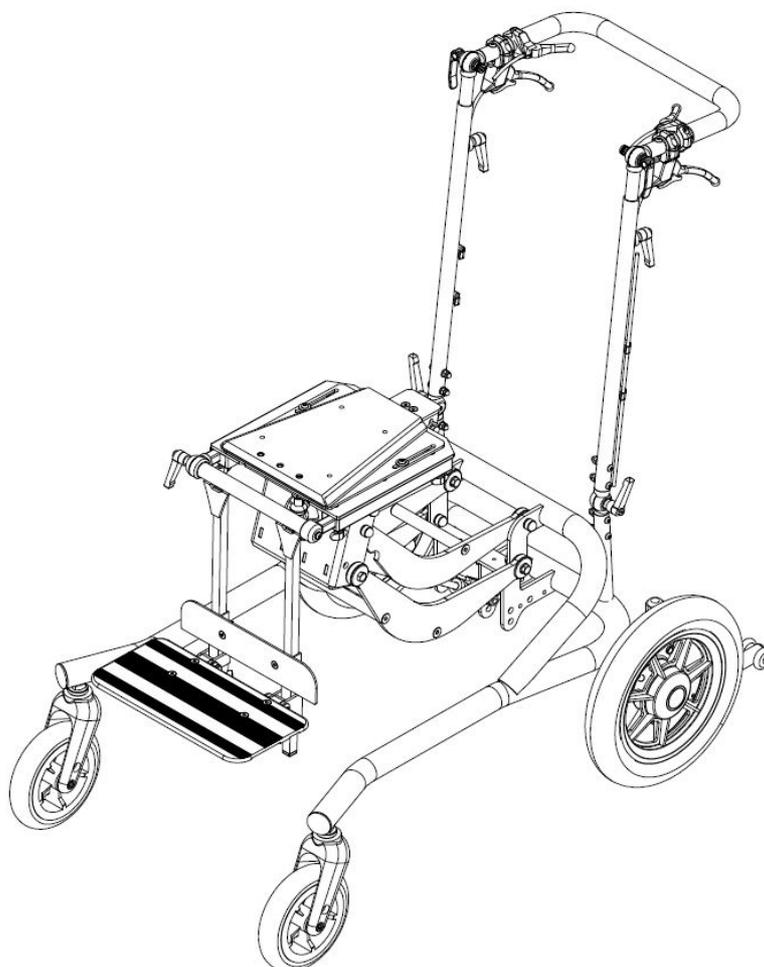

Einleitung

Für Bestellungen von Ersatzteilen sind genaue Angaben erforderlich. Nur so ist gewährleistet, dass Ihr Auftrag schnellstmöglich abgewickelt wird und Ihnen das richtige Ersatzteil zugestellt wird.

Alle Berollka-aktiv Produkte werden nach einem Baukastensystem gefertigt. Ihr Produkt gliedert sich demnach in Baugruppen. Der Ersatzteilkatalog ist somit in einzelne Gruppen gegliedert um das Auffinden des Ersatzteiles zu erleichtern.

Dabei sind die Baugruppen und Einzelteile im Ersatzteilkatalog auf den linken bzw. vorderen Seiten grafisch dargestellt und auf der rechten bzw. folgenden Seiten in einer Tabelle übersichtlich aufgelistet. Die Tabellen sind gemäß einer Stückliste vom kompletten Bauteil bis zum Einzelteil angeordnet.

Hinweis: Sonderbau-Baugruppen werden nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt.

Die Menge in der tabellarischen Darstellung ist in STÜCK oder PAAR angegeben und bezieht sich je nach Anwendung auf die Anzahl pro Produkt oder auf die jeweils dargestellte Baugruppe.

Bei Ersatzteilen mit den Auswahlmöglichkeiten `FM:..?.` müssen Sie die gewünschte Farbe im RAL-Code, bei `FB:..?.` die gewünschte Bespannungsfarbe und bei `RH...`, `ST...` und `SB...` die erforderliche Größe bzw. Maße bei einer Bestellung angeben (mögliche Varianten siehe technisches Datenblatt je Produkt).

Achtung: Nachträgliche Veränderungen an dem Produkt, sowie Kundenvereinbarungen, die die Instandzusetzende Baugruppe betreffen, sind bei einer Ersatzteilbestellung anzugeben.

Beachten Sie bitte bei der Montage der Ersatzteile die Hinweise in der Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Technische Änderungen der im Ersatzteilkatalog aufgeführten Teile behalten wir uns vor!

Tipps und Hinweise zum Ersatzteilkatalog nehmen wir dankbar entgegen und stehen Ihnen für alle Fragen jederzeit zur Verfügung.


Ihr **Berollka-aktiv** Team



Baugruppenübersicht

Alle unsere Produkte bestehen aus mehreren Baugruppen. Jedes Teil am Produkt ist einer dieser Baugruppen zugeordnet.

Zum Beispiel gehören die Lenkräder zur Baugruppe Rad (= Gruppe 6).

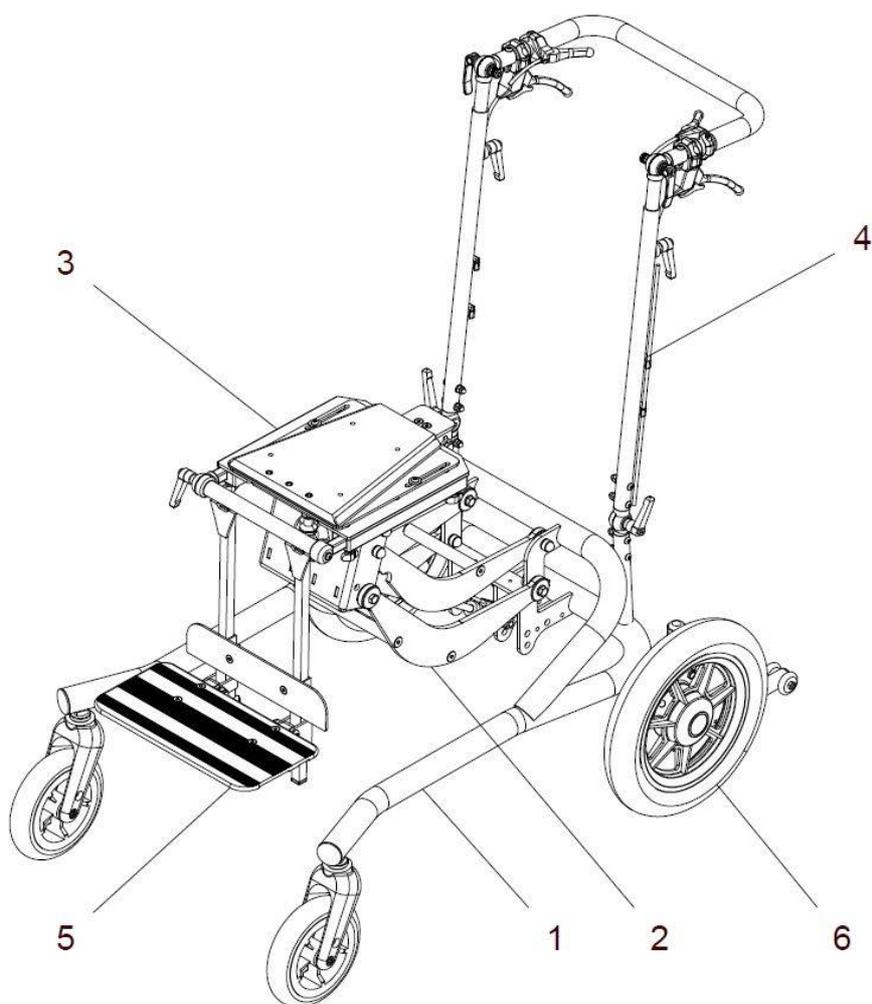

Baugruppen:

Rahmen	Gruppe 1	Schiebebügel.....	Gruppe 4
Sitz-Höhenverstellung....	Gruppe 2	Fußbrett.....	Gruppe 5
Sitz.....	Gruppe 3	Rad.....	Gruppe 6

Abkürzungen:

SB = Sitzbreite	ST = Sitztiefe	RH = Rückenhöhe
FM = Farbe der Metallteile	Gr. = Größe	FB = Farbe der Bespannung

o.Bild = ohne Bild (d.h. Position ist nicht dargestellt oder nicht sichtbar)

◆m = einkleben mittelfest / ◆h = einkleben hochfest

Abmessungen, Grundmaße und andere technische Daten entnehmen Sie bitte dem Bestellblatt.
(Download ist auf unserer Homepage www.berollka.de möglich)

Haftung/Garantie

Verwenden Sie keine Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile für Berollka-aktiv Produkte. Diese können die Betriebssicherheit des Produktes erheblich beeinträchtigen und Gefahren in sich bergen.

Berollka-aktiv übernimmt keine Haftung oder Garantie für Fremdprodukte als Ersatz- oder Zubehörteile sowie für Schäden und Unfällen, die durch deren Auswechslung oder Einbau eintreten.

Berollka-aktiv übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind.

Sicherheitshinweise bei der Verwendung von Ersatzteilen:

- ◆ Beim Austausch von Teilen nur die für dieses Produkt vorgesehenen Bauteile verwenden.
- ◆ Überprüfen Sie nach Erhalt der bestellten Ersatzteile die Richtigkeit der Lieferung.
- ◆ Nur autorisierte Fachhändler oder Fachwerkstätten dürfen Reparaturen am Produkt durchführen.
- ◆ Führen Sie nach der Reparatur des Produktes eine Probefahrt durch. Achten Sie auf ungewöhnliche Fahrgeräusche und Fahrverhalten. Prüfen Sie die **Bremsfähigkeit**, die **Lenkfähigkeit** und den **Geradeauslauf**.
- ◆ Erst nach eingehender Überprüfung und Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Produktes dem Patienten übergeben.


Anzugsdrehmomente Schrauben:

- M5 = 5Nm
- M6 = 7Nm
- M8 = 20Nm
- M16 (Mutter Bremsträger/Steckachsenadapter) = 30Nm
- M20 (Mutter Adapter Steckachse) = 30Nm


Mit Schraubensicherung (Mittelfest) einkleben

Rahmen

Gruppe 1

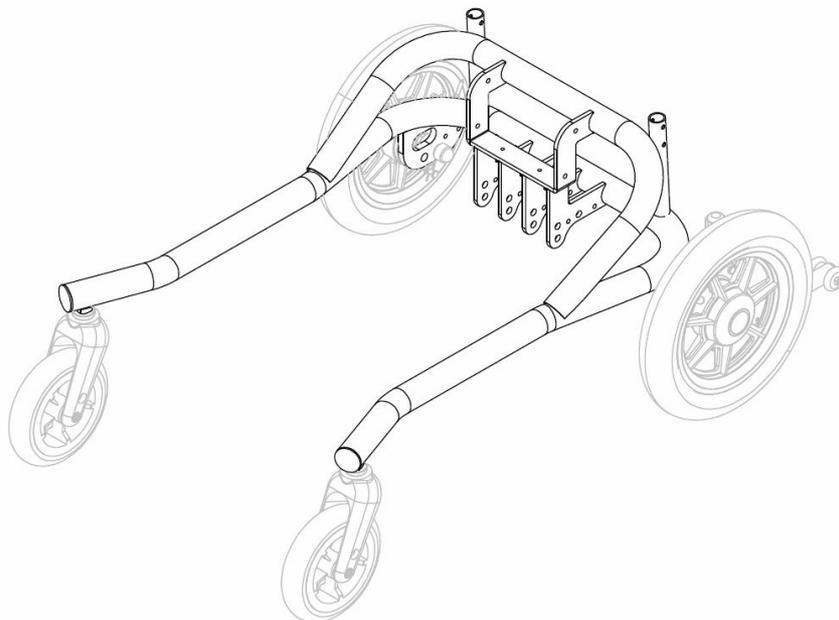


Rahmen

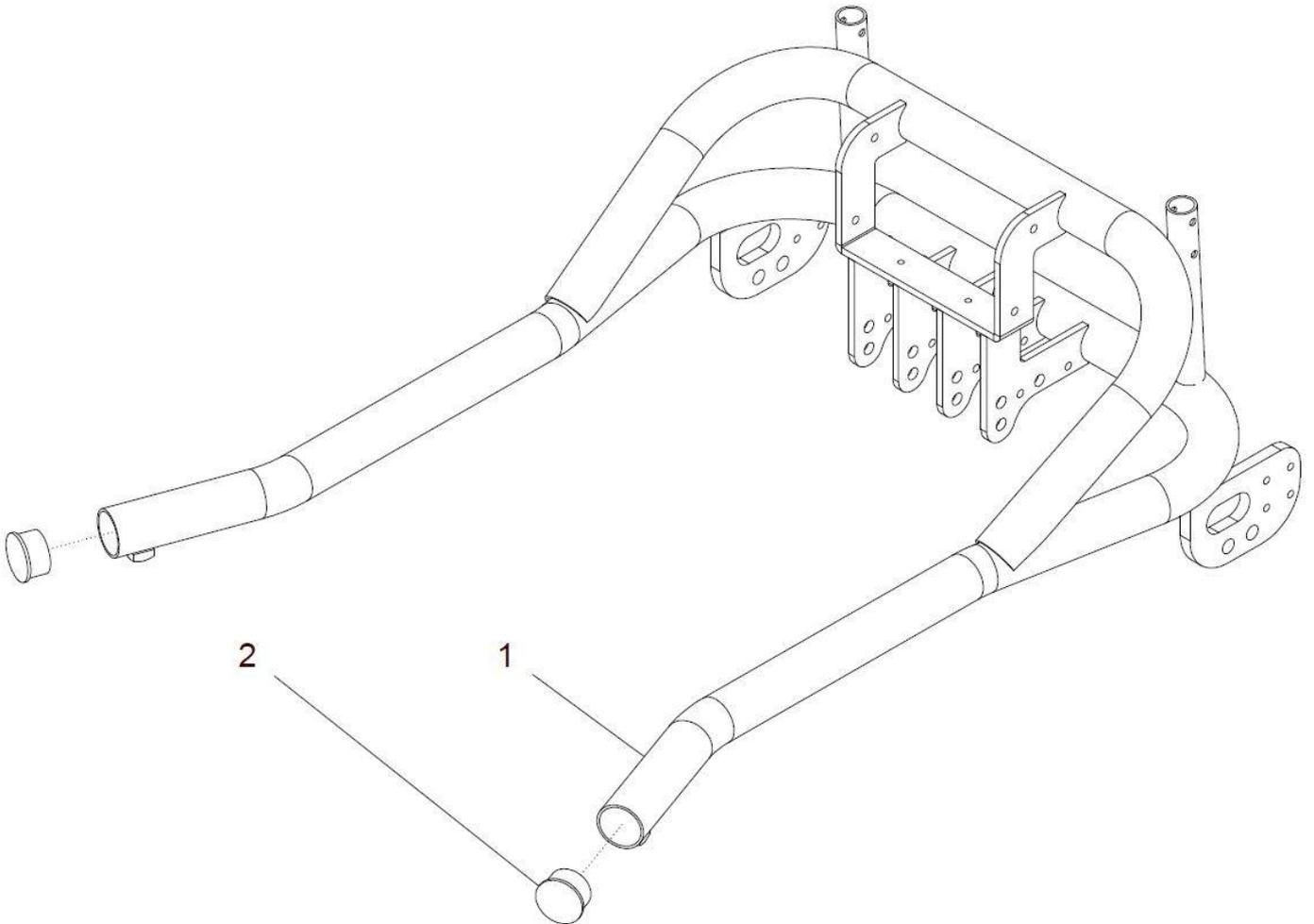


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	M80 110 00	Grundgestell / Rahmen FLOH HB kpl. FM: ?	1 St.
1	M80 110 01	Grundgestell / Rahmen FLOH HB FM: ?	1 St.
2	04 210 20	Verschlussstopfen ø38 schwarz	2 St.

Kippsicherung

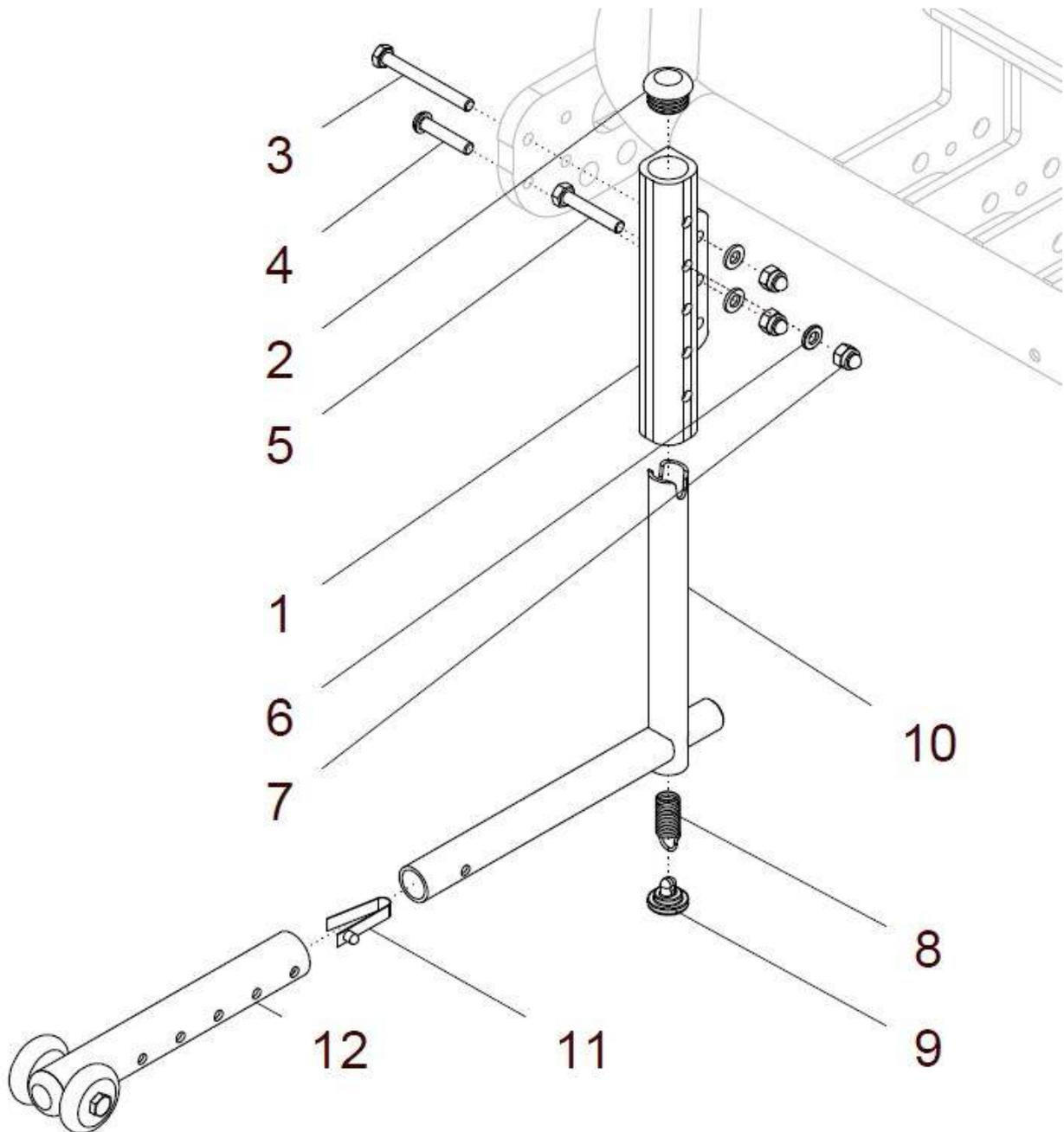

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	M80 170 00	Kippsicherung rechts FLOH HB abschwenkbar kpl. mit Adapter	1 St.
1 – 12	M80 170 05	Kippsicherung links FLOH HB abschwenkbar kpl. mit Adapter	1 St.
1	50 172 04	Adapter für Kippsicherung	1 St.
2	04 210 02	KU - Verschußstopfen ø23	1 St.
3	01 110 09	Sechskantschraube M6x55 - DIN 931 A2	1 St.
4	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380 A2	1 St.
5	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
6	01 320 02	Scheibe ø6,4 - DIN 125 A2	3 St.
7	01 210 83	Hutmutter selbstsichernd M6 – DIN 986 A2	3 St.
8	02 120 01	Zugfeder für Kippsicherung	1 St.
9	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
10	30 192 52	Kippsicherungsadapter gerade	1 St.
11	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
12	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.


Kippsicherung (bei Radstandsverlängerung)

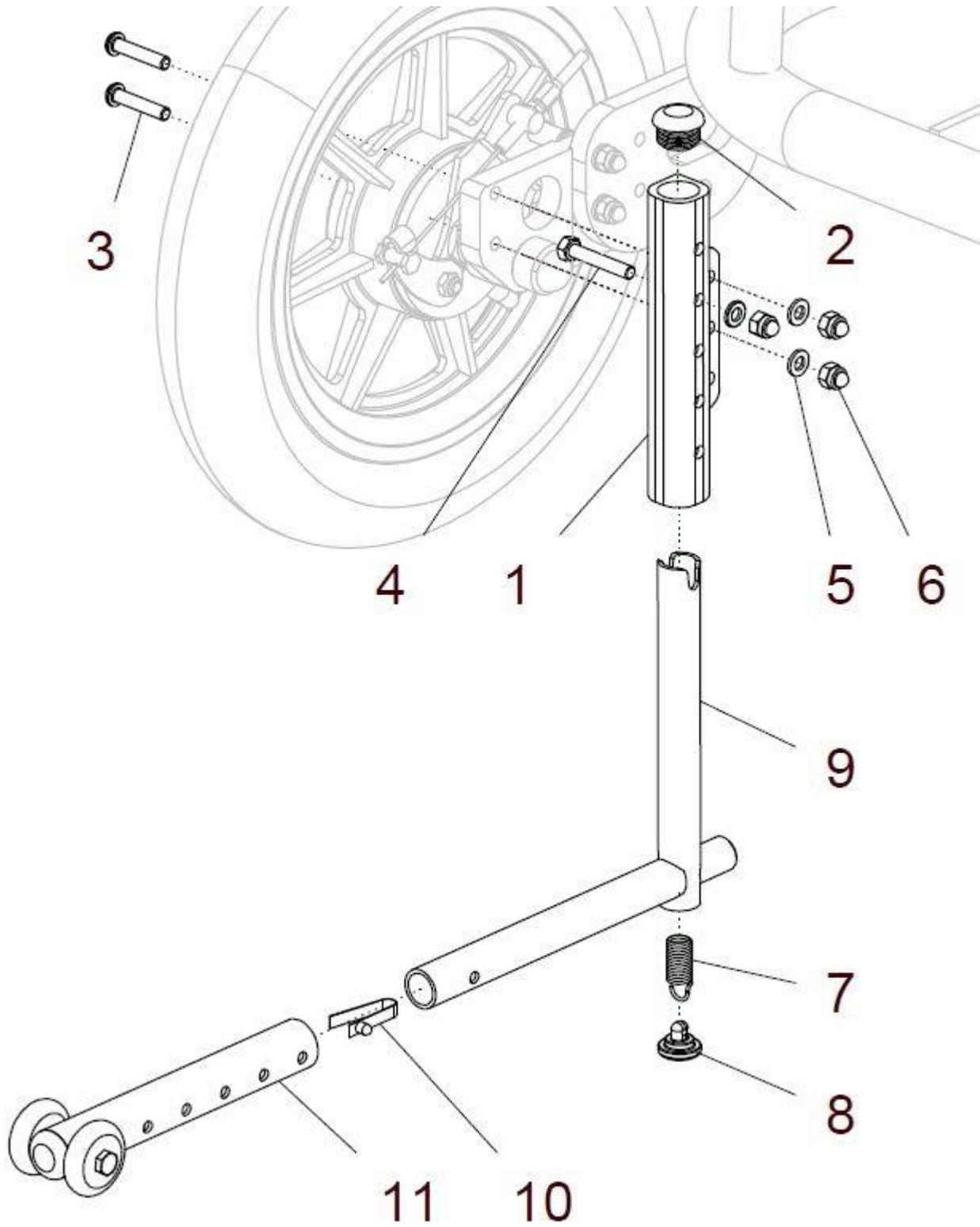


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	M80 170 50	Kippsicherung re. FLOH abschwenkbar bei Radstandsverl. mit Adapter kpl.	1 St.
1 – 11	M80 170 55	Kippsicherung li. FLOH abschwenkbar bei Radstandsverl. mit Adapter kpl.	1 St.
1	50 172 04	Adapter für Kippsicherung	1 St.
2	04 210 02	KU - Verschußstopfen ø23	1 St.
3	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380 A2	2 St.
4	25 195 21	Bolzen ø6 / L32 Kippsicherung	1 St.
5	01 320 02	Scheibe ø6,4 - DIN 125 A2	3 St.
6	01 210 83	Hutmutter selbstsichernd M6 – DIN 986 A2	3 St.
7	02 120 01	Zugfeder für Kippsicherung	1 St.
8	50 191 01	Deckel für Zugfeder	1 St.
9	30 192 52	Kippsicherungsadapter gerade	1 St.
10	02 320 01	Stativfeder mit Bolzen	1 St.
11	50 193 00	Kippsicherungsrad kpl.	1 St.

Sitz-Höhenverstellung

Gruppe 2

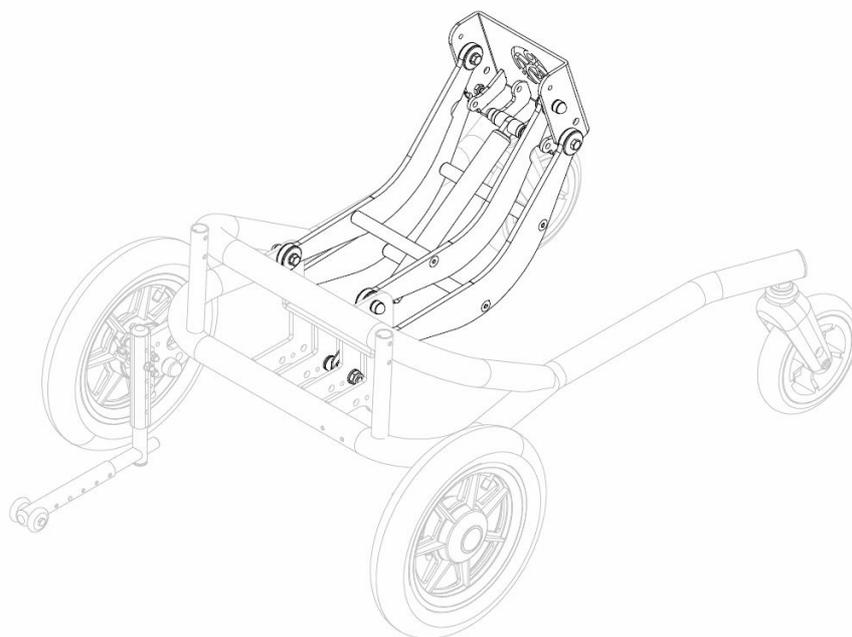


Sitz - Höhenverstellung

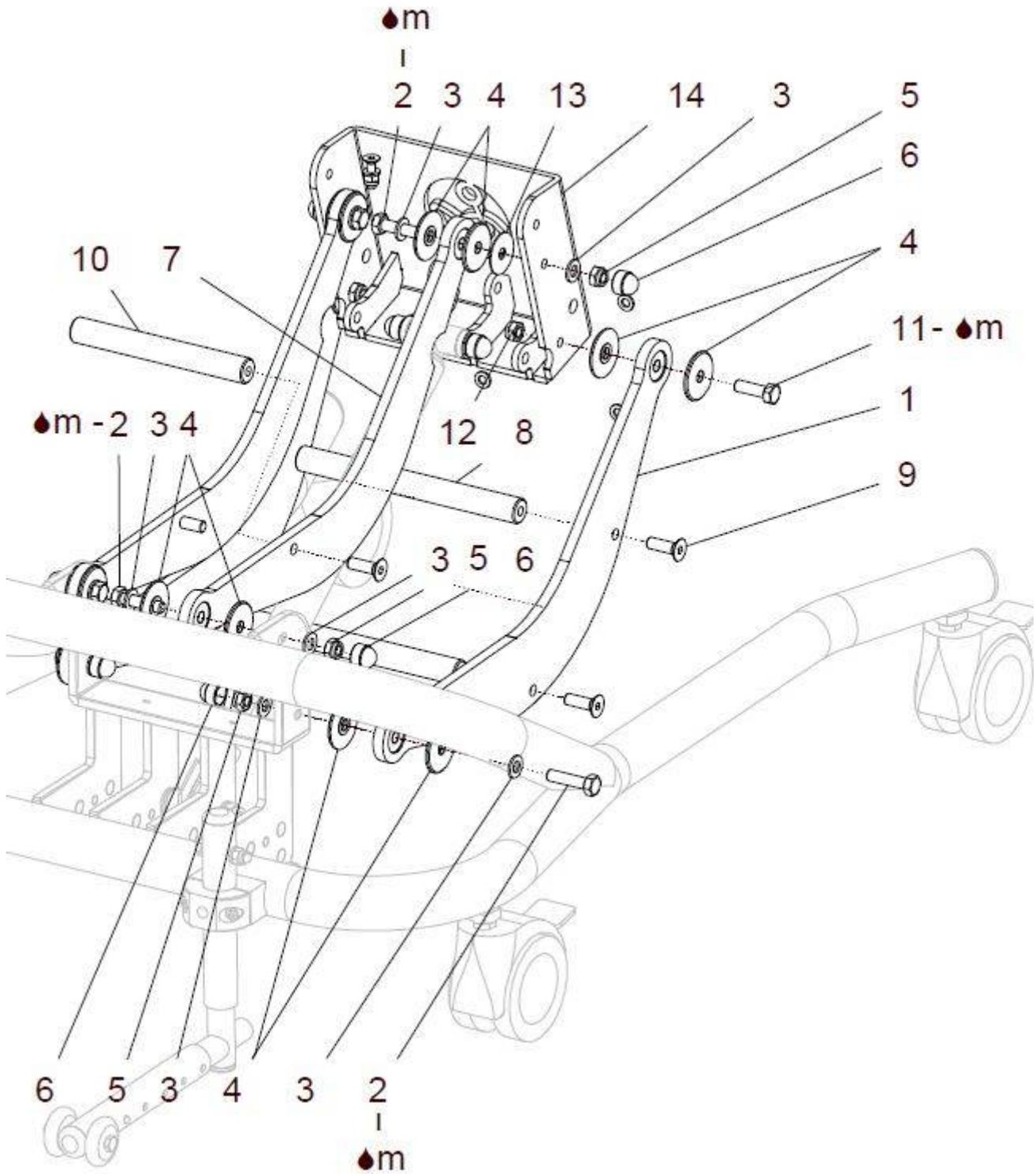


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 14	M70 211 00	Sitz - Höhenverstellung FLIP / FLOH HB kpl. Sitzgestänge mit Sitzrahmenaufnahme (ohne Gasdruckfeder) FM: ?	1 St.
1a	M70 211 61	Sitzgestänge rechts lang unten außen mit Lager kpl.	1 St.
1b	M70 211 71	Sitzgestänge links lang unten außen mit Lager kpl.	1 St.
2	M70 211 53	Gelenkbolzen M8	6 St.
3	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	12 St.
4	M70 211 51	Deckel für Lager	16 St.
5	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	6 St.
6	04 211 04	KU - Abdeckkappe Sechskant M8 SW13	6 St.
7a	M70 211 66	Sitzgestänge rechts lang oben innen mit Lager kpl.	1 St.
7b	M70 211 76	Sitzgestänge links lang oben innen mit Lager kpl.	1 St.
8	M70 211 24	Distanzbolzen außen / unten	2 St.
9	01 120 26	Senkschraube M8x25 - DIN 7991 A2	6 St.
10	M70 211 29	Distanzbolzen innen / oben	1 St.
11	M70 315 22	Gelenkbolzen M8	2 St.
12	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
13	M70 211 52	Unterlegscheibe Sitzgestänge	2 St.
14	M70 321 01	Sitzrahmenaufnahme FM: ?	1 St.

Gasdruckfeder FLOH HB Höhenverstellung 1-fach

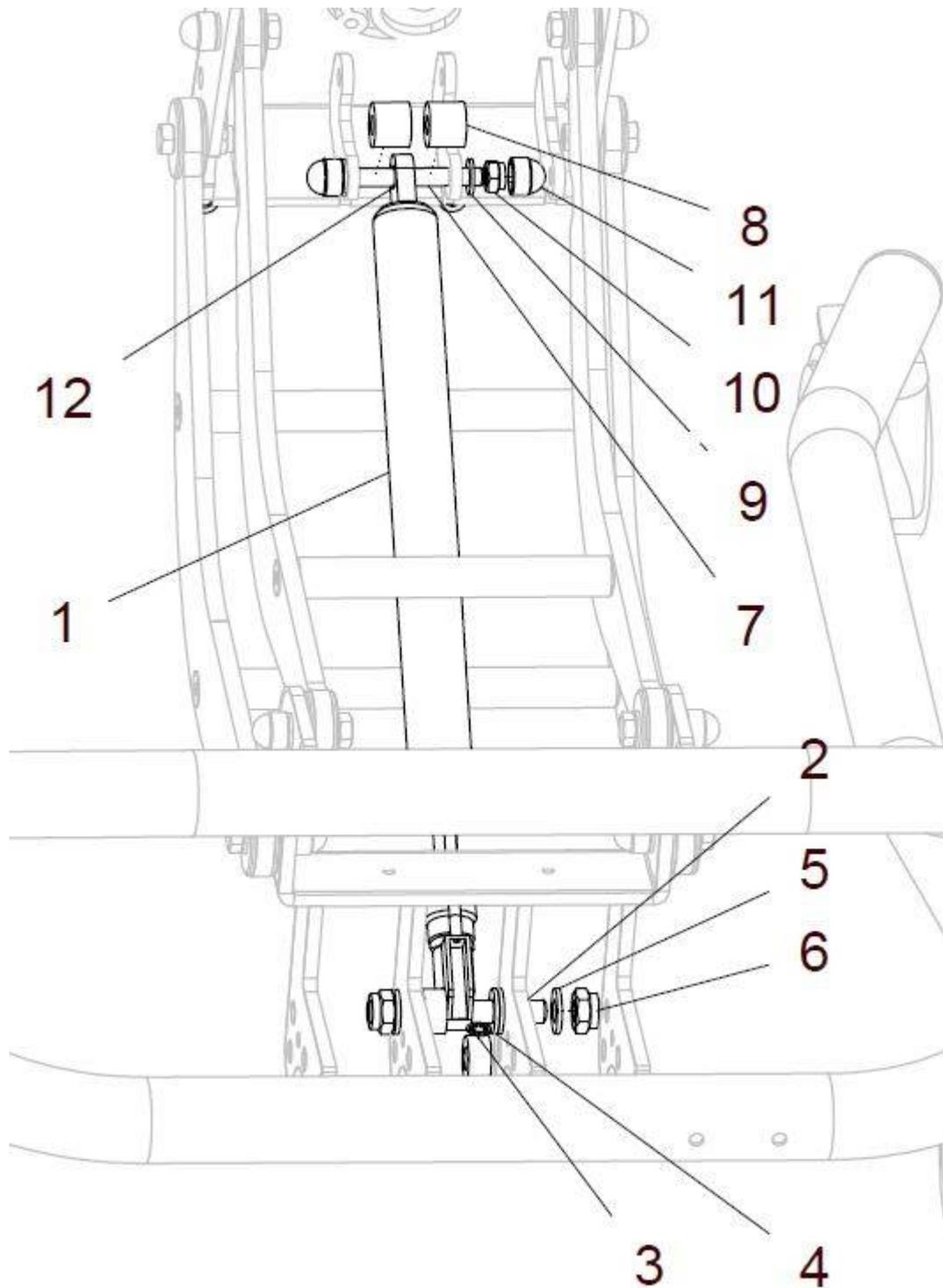

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 12	M70 212 90	Gasdruckfeder - Höhenverstellung FLIP / FLOH HB 1-fach kpl. (ohne Bowdenzug)	1 St.
1	M70 212 00	Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung mit Auslösung kpl.	1 St.
2	M70 110 02	Gewindeachse M10	1 St.
3	U40 312 41	Distanzbuchse ø10	2 St.
4	01 310 04	Scheibe 10,5 – DIN 125 PE	4 St.
5	01 320 04	Scheibe 10,5 - DIN 125 A2	2 St.
6	01 210 05	Mutter selbstsichernd M10 - DIN 985 A2	2 St.
7	M70 321 21	Bolzen M8	1 St.
8	04 212 26	Distanzbuchse ø8	2 St.
9	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
10	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
11	04 211 04	KU - Abdeckkappe Sechskant M8 SW13	2 St.
12	M70 313 51	Reduzierhülse ø10 / ø8	1 St.

Gasdruckfeder FLOH HB Höhenverstellung 2-fach

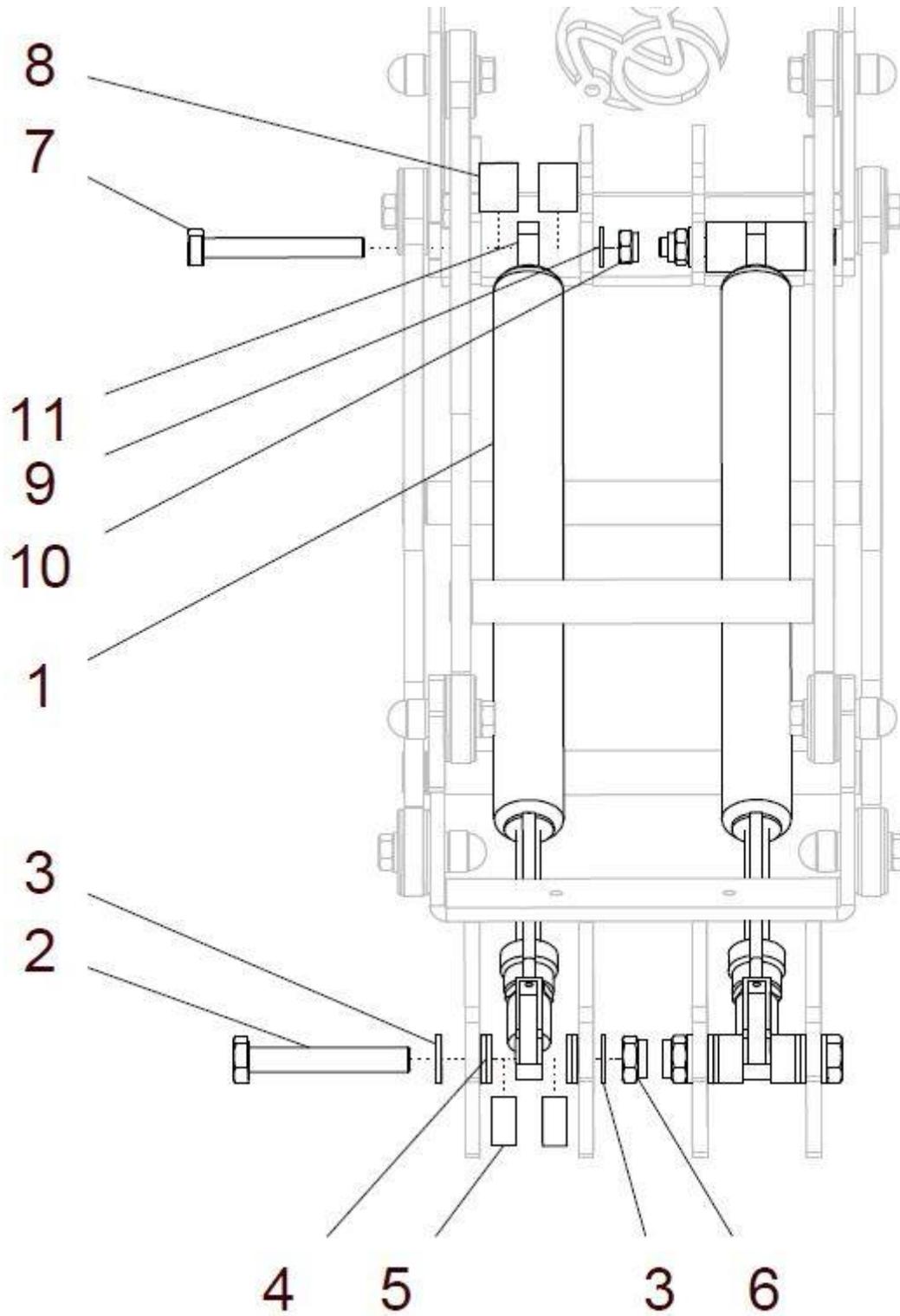


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	M80 212 20	Gasdruckfeder - Höhenverstellung FLOH HB 2-fach kpl. 2xGasdruckfeder mit Schrauben, Scheiben und Muttern (ohne Bowdenzug -> siehe Pedal)	1 Set
1	M70 212 00	Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung mit Auslösung kpl.	2 St.
2	01 110 47	Sechskantschraube M10x65 - DIN 931 A2	2 St.
3	01 320 04	Scheibe 10,5 - DIN 125 A2	4 St.
4	01 310 04	Scheibe 10,5 – DIN 125 PE	8 St.
5	U40 312 41	Distanzbuchse ø10	4 St.
6	01 210 05	Mutter selbstsichernd M10 - DIN 985 A2	2 St.
7	U43 312 42	Bolzen M8	2 St.
8	04 212 26	Distanzbuchse ø8	4 St.
9	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
10	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
11	M70 313 51	Reduzierhülse ø10 / ø8	2 St.

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 11	M80 212 80	Umbausatz Gasdruckfeder-Höhenverstg. FLOH HB 2-fach kpl. Umbausatz von 1x Gasdruckfeder Höhenverstellung auf 2x Gasdruckfeder Höhenverstellung beim FLOH, mit Bowdenzug und Auslösehebel	1 St.
1	M70 212 00	Gasdruckfeder Sitzhöhenverstellung mit Auslösung kpl.	1 St.
2	01 110 47	Sechskantschraube M10x65 - DIN 931 A2	2 St.
3	01 320 04	Scheibe 10,5 - DIN 125 A2	4 St.
4	01 310 04	Scheibe 10,5 – DIN 125 PE	8 St.
5	U40 312 41	Distanzbuchse ø10	2 St.
6	01 210 05	Mutter selbstsichernd M10 - DIN 985 A2	2 St.
7	U43 312 42	Bolzen M8	2 St.
8	04 212 26	Distanzbuchse ø8	2 St.
9	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
10	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
11	M70 313 51	Reduzierhülse ø10 / ø8	1 St.


⇒ Zusätzlich kompl.Auslösung Gasdruckfeder Höhenverstellung 2-fach s. 2.11

Auslösung Gasdruckfeder Höhenverstellung 1- fach

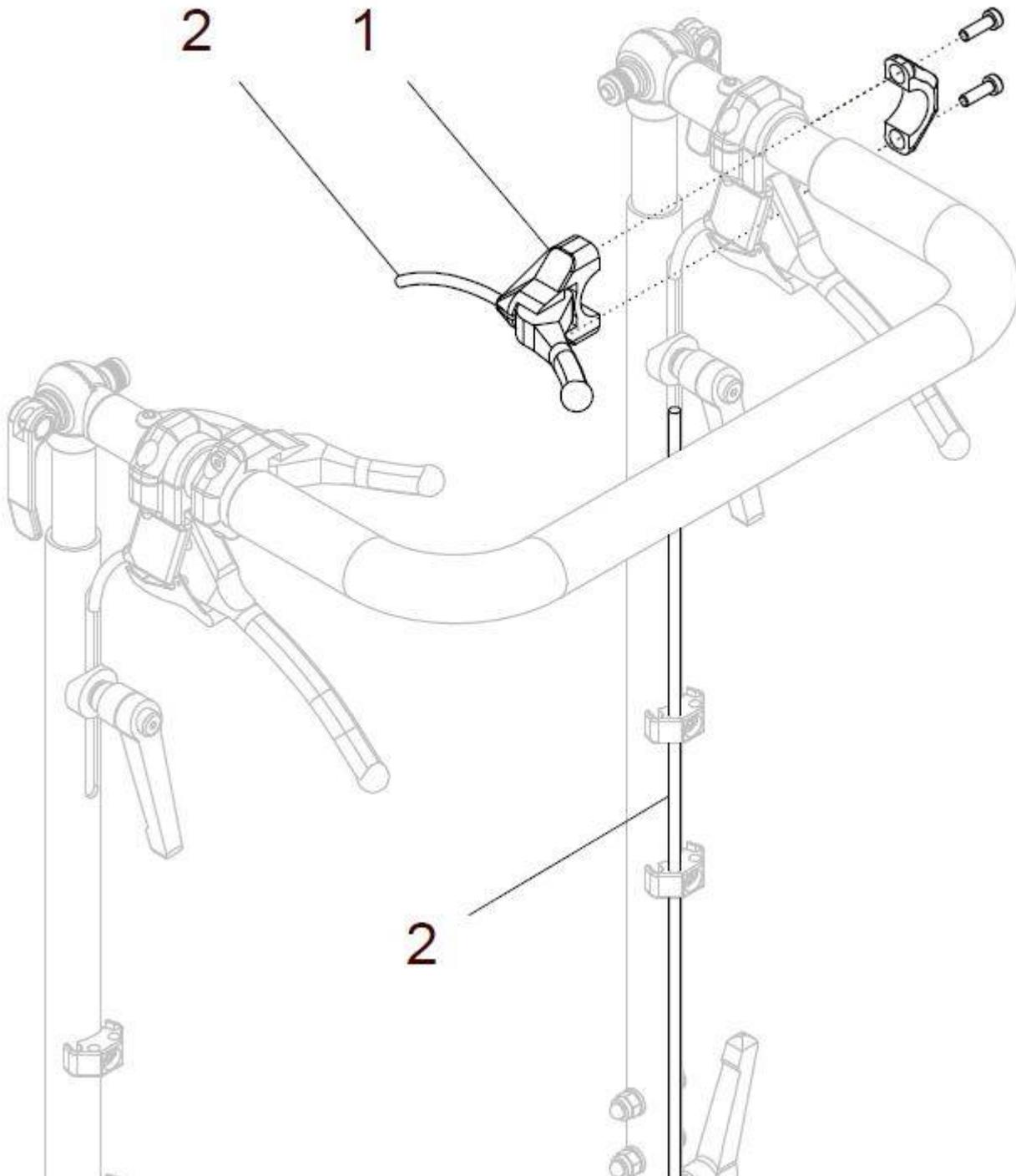

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	M80 215 00	Auslösezug für Gasdruckfeder Höhenverstellung 1-fach kpl. FLOH HB	1 St.
1	05 401 11	Hebel groß (geklemmt)	1 St.
2	U40 313 11	Bowdenzug Gasdruckfeder Höhenverstellung FLOH HB kpl.	1 St.


Auslösung Gasdruckfeder Höhenverstellung 2-fach

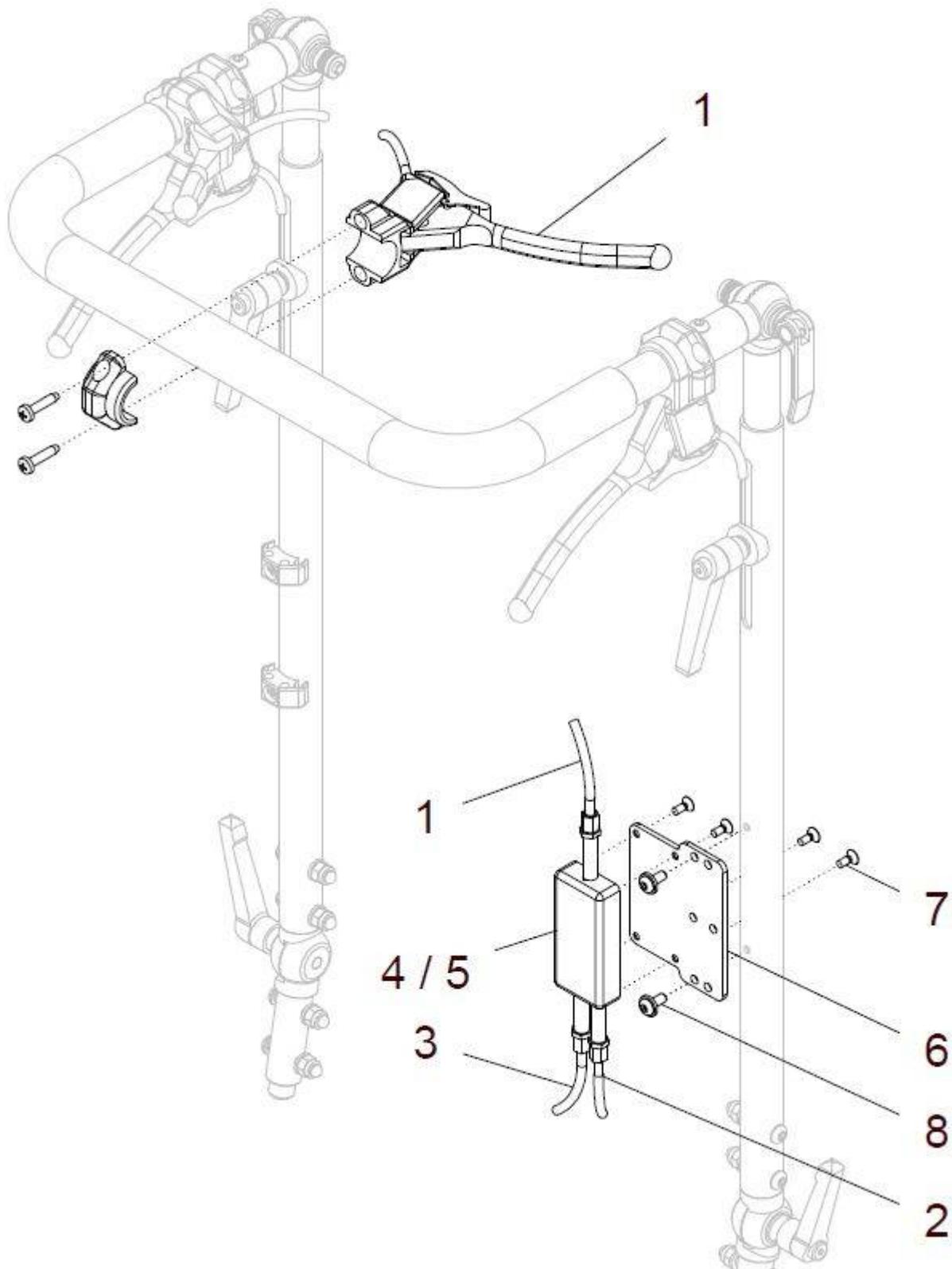


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 8	M80 215 20	Doppel-Auslösezug für 2x Gasdruckfeder FLOH HB kpl. Hebel mit Bowdenzug und Y-Weiche, mit 2x Bowdenzug, mit Platte und mit Befestigung für Rückenrohr	1 St.
1	25 228 05	Bowdenzug mit Hebel lang (Bremsgriff) und Stellhülse montiert	1 St.
2	U40 333 41	Bowdenzug unten rechts (L1=710mm)	1 St.
3	U40 333 43	Bowdenzug unten links (L1=810mm)	1 St.
4	U40 333 22	Gehäuse für Y-Weiche	1 St.
5	U40 333 21	Schieber	1 St.
6	U40 333 61	Platte für Y-Weiche	1 St.
7	01 121 40	Linsensenkschraube M4x10 – ISO 7047 A2	4 St.
8	01 156 54	Linsenkopfschraube M5x12 – ISO 7380F ZNS	2 St.

Sitz

Gruppe 3

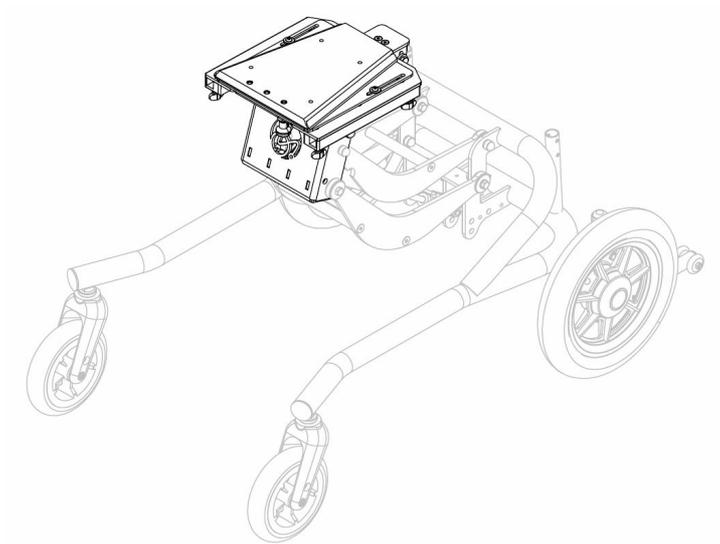

Sitz

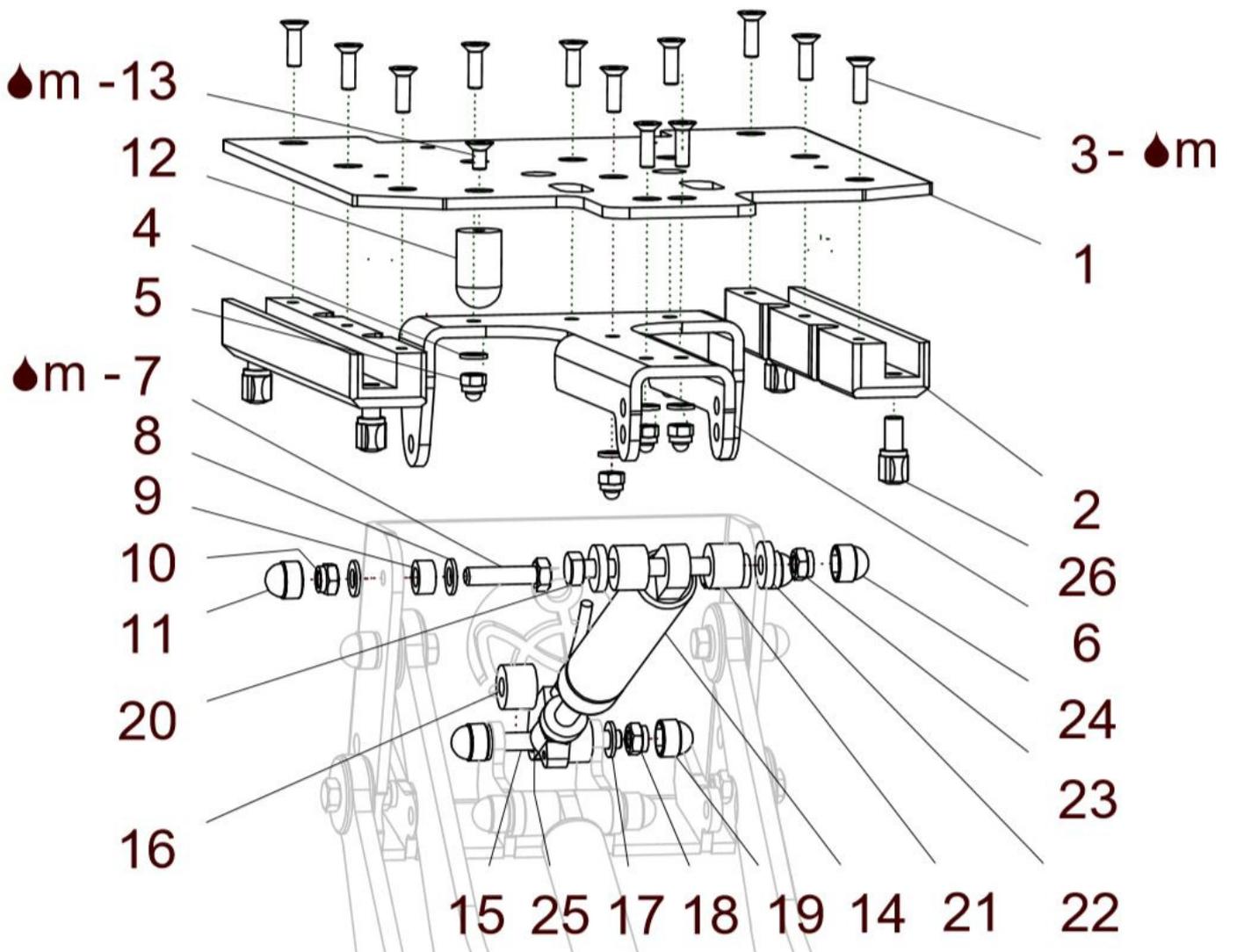


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 25	M70 310 50	Sitz mit Gasdruckfeder FLIP HB / Floh HB kpl. Sitzplatte mit Führungsgabel, Gelenkbolzen und Gasdruckfeder (ohne Bowdenzug) FM: ?	1 St.
1	M70 315 11	Sitzplatte für FLIP HB FM: ?	1 St.
2	M61 322 19	Aufnahmeschiene	2 St.
3	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991 A2	12 St.
4	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	6 St.
5	01 210 83	Hutmutter selbstsichernd M6 - DIN 986 A2	6 St.
6	M70 315 21	Führungsgabel	1 St.
7	M70 211 53	Gelenkbolzen M8	2 St.
8	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	4 St.
9	U20 312 01	Distanzbuchse ø8,5	2 St.
10	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
11	04 211 04	KU - Abdeckkappe Sechskant M8 SW13	2 St.
12	M70 315 12	Anschlagbolzen	1 St.
13	01 120 11	Senkschraube M6x16 – DIN 7991 A2	1 St.
14 - 26	M70 313 90	Gasdruckfeder Sitzwinkelverstellung kpl. mit Auslösung, Bowdenzug und Befestigungsteile	1 St.
14	M70 313 55	Gasdruckfeder Sitzwinkelverstellung mit Auslösung kpl.	1 St.
15	M70 321 21	Bolzen für Gasdruckfeder M8	1 St.
16	04 212 24	Distanzbuchse ø8,4	2 St.
17	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
18	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
19	04 211 04	KU - Abdeckkappe Sechskant M8 SW13	2 St.
20	M70 315 23	Gelenkbolzen M8 L=65	1 St.
21	04 212 24	Distanzbuchse ø8,4	2 St.
22	01 322 03	Scheibe ø8,4 - DIN 7349 (4mm dick) A2	2 St.
23	01 210 04	Mutter selbstsichernd M8 - DIN 985 A2	2 St.
24	04 211 04	KU - Abdeckkappe Sechskant M8 SW13	2 St.
25	U20 302 11	Reduzierhülse ø10 / ø8 B=8	1 St.

bei Bedarf:


26a	01 191 09	Flügelschraube M8x15 (bei Verwendung von Schiebebügel und Fußbrett)	4 St.
26b	01 191 09	Flügelschraube M8x15 (bei Verwendung von Fußbrett oder Schiebebügel)	2 St.

Trapezadapter ALU / Kunststoff

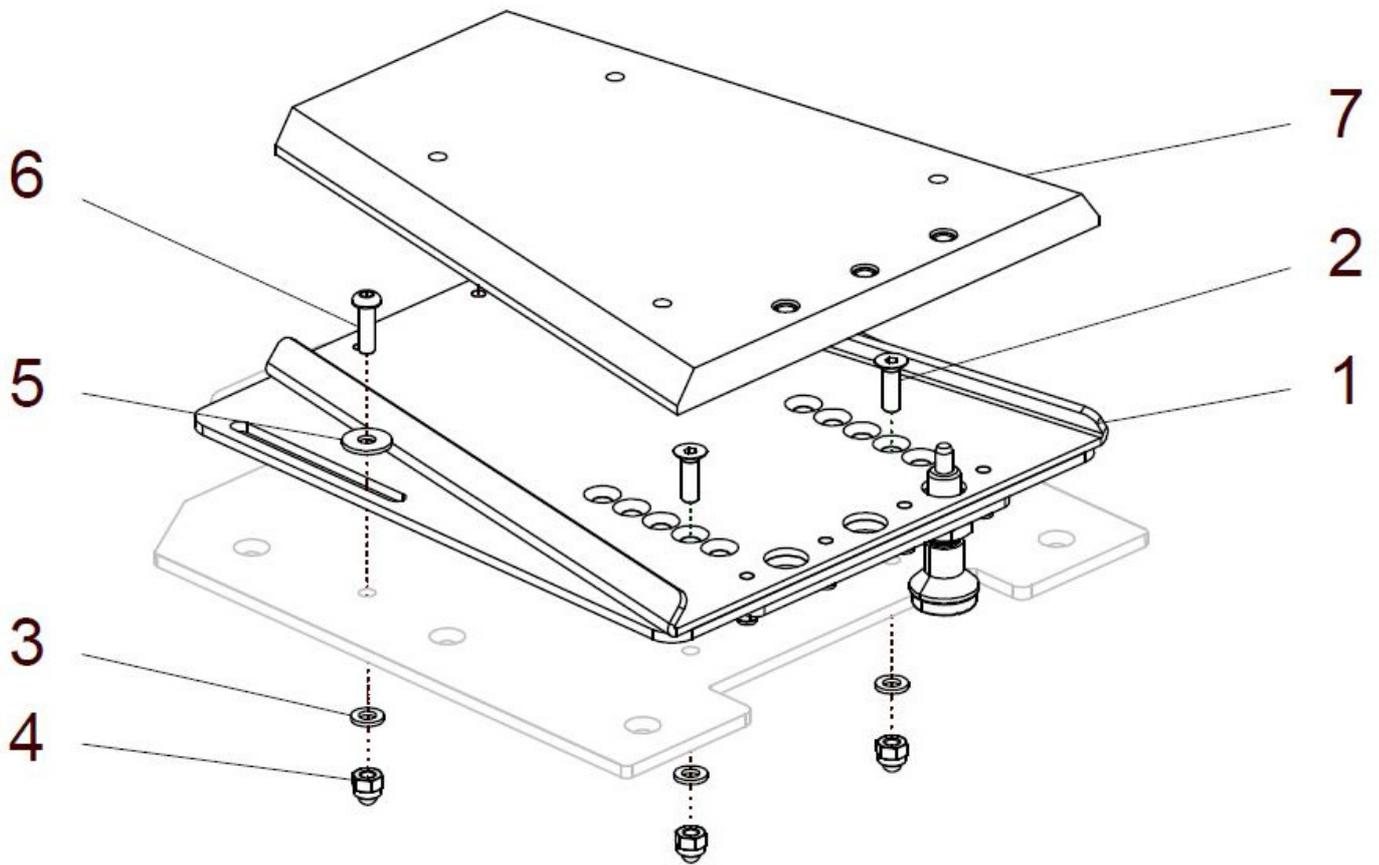


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	M70 331 00	Trapezadapter Alu / Kunststoff Flip HB / Floh HB kpl. Trapezadapteroberenteil und Trapezadapterunterteil mit Befestigung für Flip HB oder Floh HB	1 St.
1	U40 315 25	Trapezadapterunterteil Alu mit Klemmplatte / Arretierbolzen kpl. Trapezadapterunterteil Alu mit Auflageplatte verschraubt und angeschraubte Klemmpatte mit Arretierbolzen	1 St.
2	01 120 12	Senkschraube M6x20 - DIN 7991 A2	2 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	4 St.
4	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986 A2	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 gross - DIN 9021 A2	2 St.
6	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380 vz	2 St.
7	U40 315 10	Trapezadapteroberenteil Kunststoff mit Buchsen	1 St.

HC - Trapezadapter

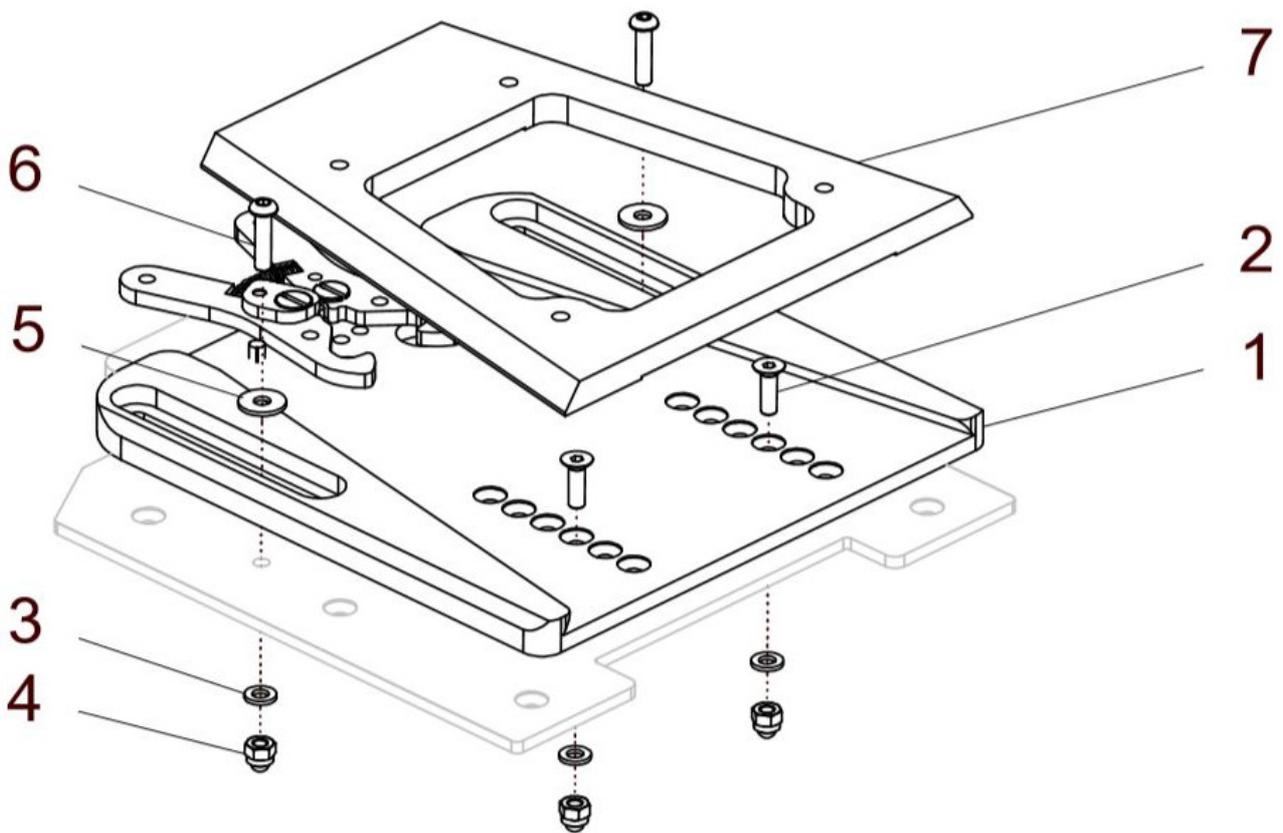


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 7	M70 332 00	HC-Trapezadapter Aluminium Flip HB / Floh HB kpl. HC-Trapezadapter-Oberteil und Unterteil	1 St.
1	U40 315 70	Trapezadapterunterteil HC-Aluminium kpl.	1 St.
2	01 120 12	Senkschraube M6x20 – DIN 7991 A2	2 St.
3	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	4 St.
4	01 210 83	Hutmutter M6 - DIN 986 A2	4 St.
5	01 321 02	Scheibe 6,4 gross - DIN 9021 A2	2 St.
6	01 153 22	Linsenkopfschraube M6x20 - ISO 7380 vz	2 St.
7	U40 315 61	Trapezadapteroberteil Alu	1 St.

Auslösung Gasdruckfeder-Sitzkantelung an Sitzplatte -standard-

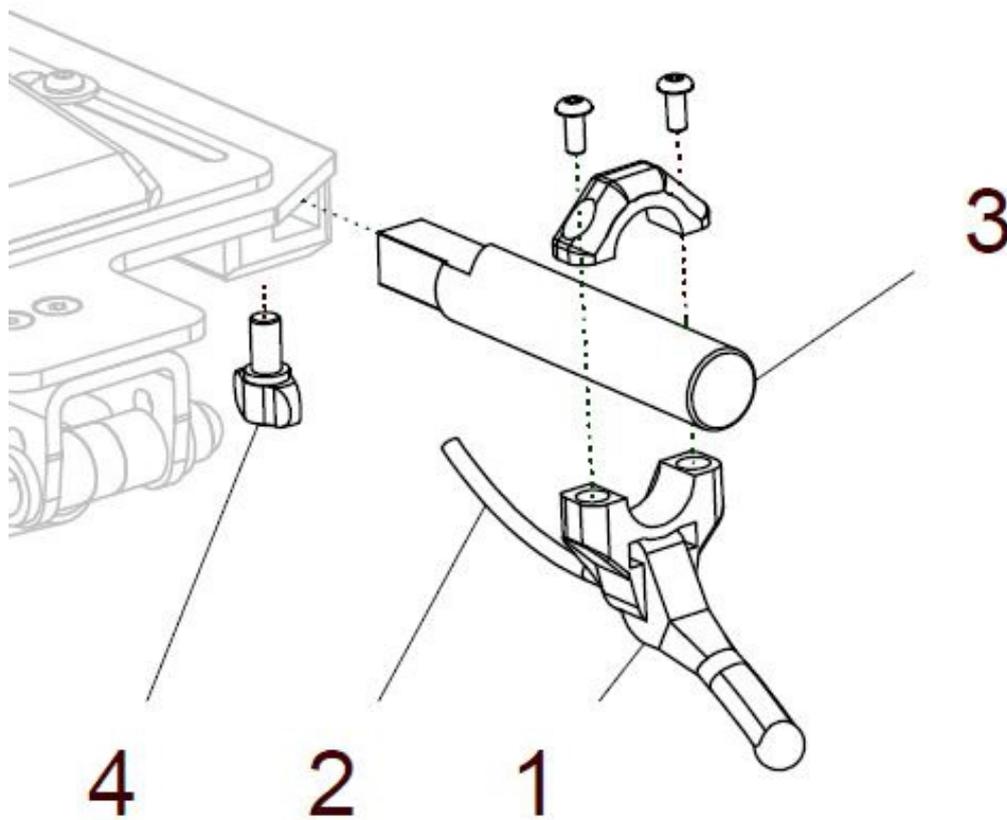

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 4	M70 313 00	Auslösezug für Gasdruckfeder an Sitzplatte kpl. für Sitzrahmen/-platte FLIP / FLOH HB (für Sitzwinkelverstellung)	1 St.
1	05 401 11	Hebel groß (geklemmt)	1 St.
2	M70 313 10	Bowdenzug Sitzwinkelverstellung kpl. (für Auslösung an der Sitzplatte)	1 St.
3	M70 315 01	Befestigungsbolzen für Auslösehebel	1 St.
4	01 191 09	Flügelschraube M8x15	1 St.


Auslösung Gasdruckfeder-Sitzkantelung am Schiebebügel

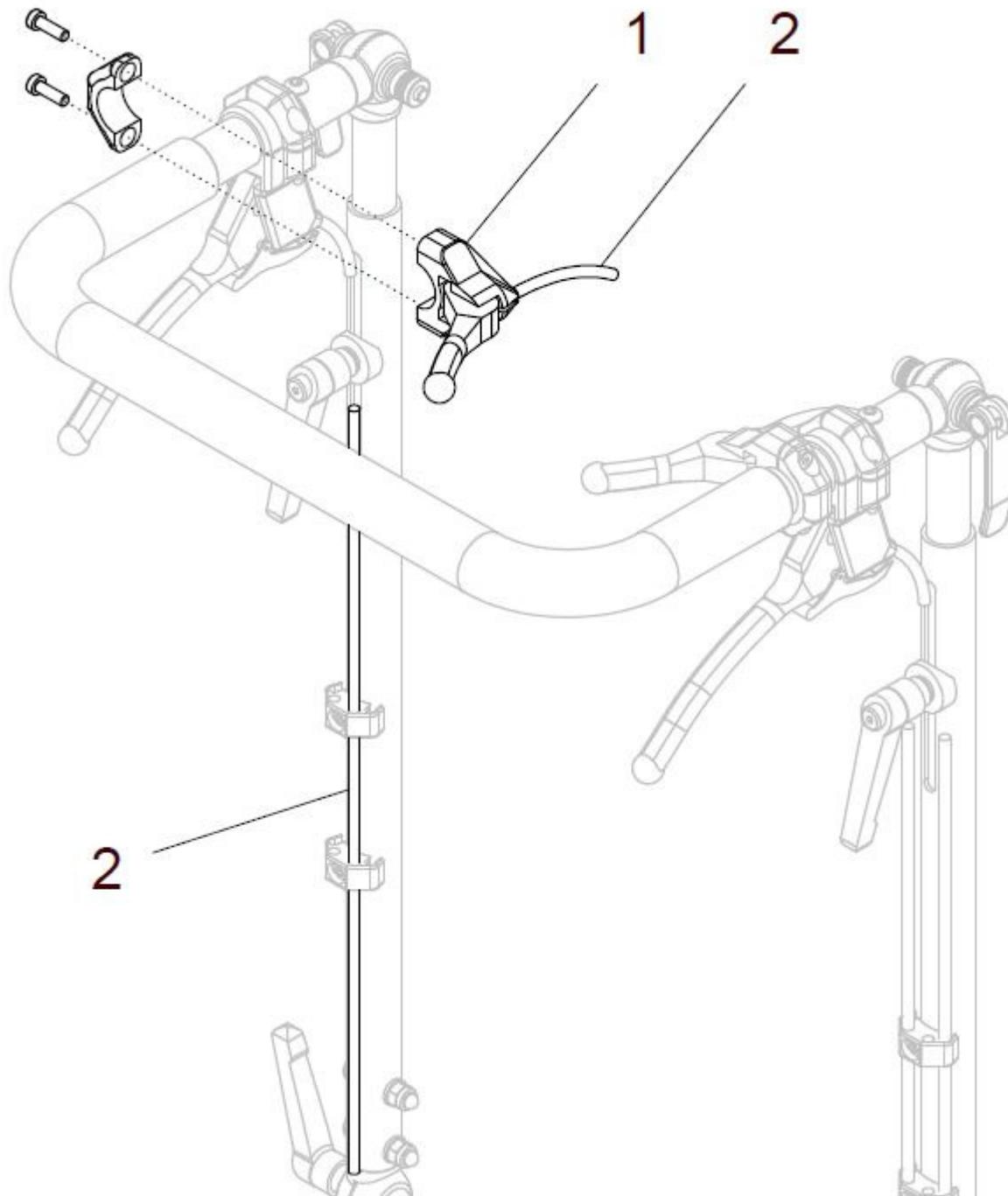


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 2	M80 315 00	Auslösezug für Gasdruckfeder am Schiebebügel kpl. für Sitzkantelung FLIP / FLOH HB (Sitzwinkelverstellung)	1 St.
1	05 401 11	Hebel groß (geklemmt)	1 St.
2	U40 313 16	Bowdenzug Gasdruckfeder Sitzwinkelverstellung FLOH (für Auslösung am Schiebebügel)	1 St.

Rücken

Gruppe 4

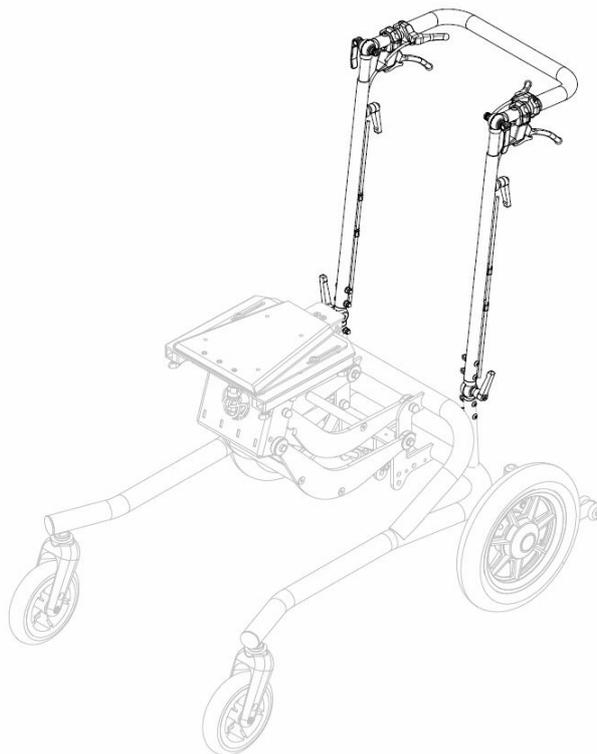

Rücken

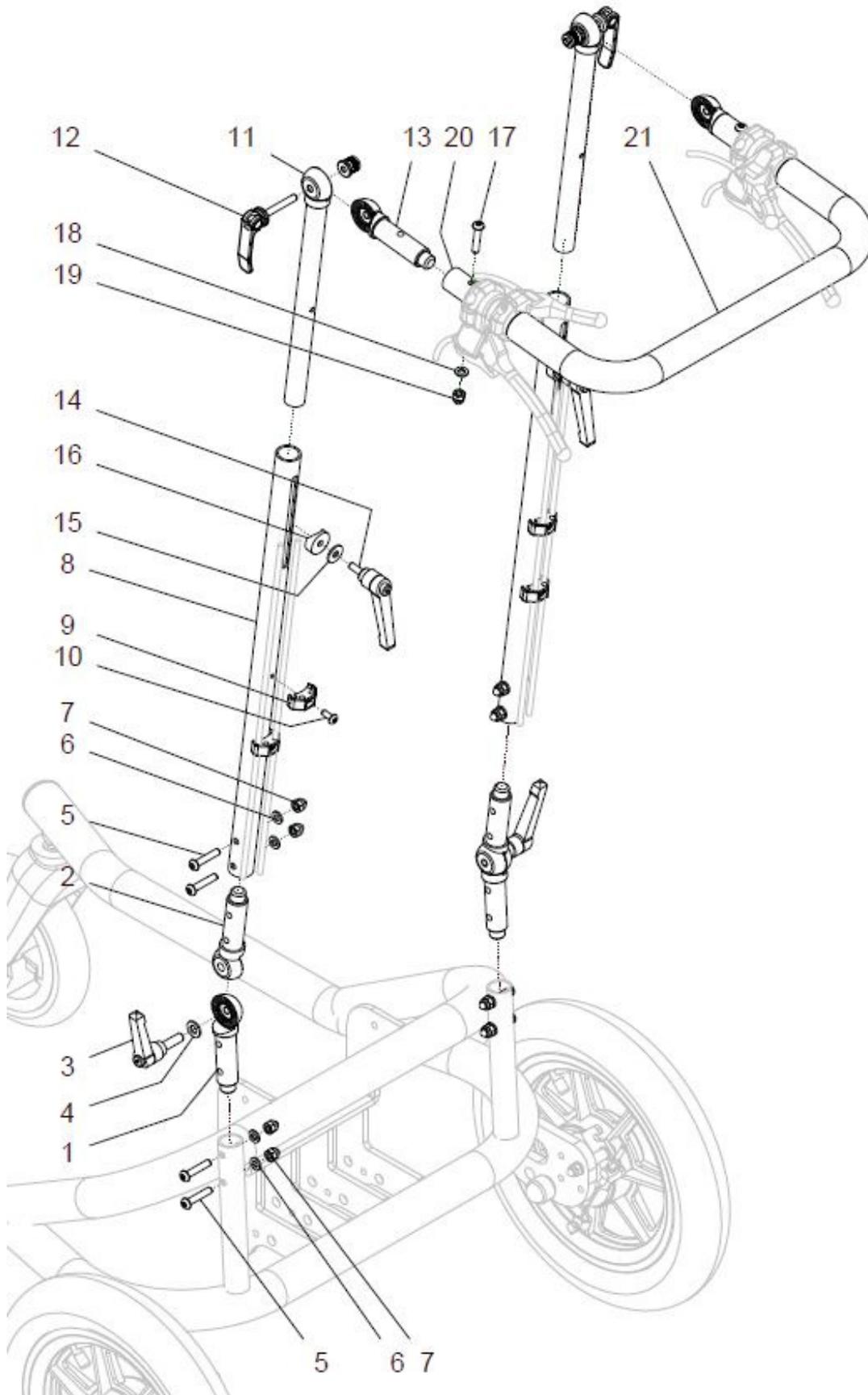


Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 21	M80 210 00	Rücken FLOH HB kpl. mit Zahnsegmente, Rückenrohre und Handbogen mit Überzug FM: ?	1 St.
1a, 2a, 3 - 10	M80 210 12	Rückenrohr rechts FLOH HB kpl. mit Gelenk unten FM: ?	1 St.
1b, 2b, 3 - 10	M80 210 13	Rückenrohr links FLOH HB kpl. mit Gelenk unten FM: ?	1 St.
1 - 7	M80 211 10	Gelenk unten FLOH HB kpl.	2 St.
1a	U40 541 11	Gelenkstück M8 links unten montiert	1 St.
1b	U40 561 32	Gelenkstück ø8,0 rechts unten montiert	1 St.
2a	U40 561 32	Gelenkstück ø8,0 links oben montiert	1 St.
2b	U40 541 11	Gelenkstück M8 rechts oben montiert	1 St.
3	01 190 02	Klemmhebel M8x25	2 St.
4	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
5	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380 A2	8 St.
6	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	8 St.
7	01 210 83	Hutmutter selbstsichernd M6 – DIN 986 A2	8 St.
8	M80 210 21	Rückenrohr FM: ?	2 St.
9	05 403 81	Bowdenzugbefestigung 2-fach	4 St.
10	01 152 02	Linsenkopfschraube M5x12 – ISO 7380 A2	4 St.
11 - 21	M80 210 50	Rückenoberteil / Handbogen FLOH HB kpl. mit Gelenk oben und Handbogen mit Überzug FM: ?	1 St.
11 - 19	U40 211 60	Gelenk 45 / 240 mit Zahnsegment / Klemmhebel kpl. Gelenkstücke 45 / 240 mit Schnellspannhebel und mit Klemmhebel M6x20, Halbschale und Scheibe mit Befestigung für Handbogen	2 St.
11 - 13	U40 211 70	Gelenk 45 / 240 mit Zahnsegment kpl. und mit Schnellspannhebel	2 St.
11	U40 211 72	Gelenkstück 240 mit Zahnsegment	2 St.
12	01 198 02	Schnellspannhebel M6x40	2 St.
13	U40 211 71	Gelenkstück 45mm mit Zahnsegment	2 St.
14	01 190 11	Klemmhebel M6x15	2 St.
15	01 321 02	Scheibe 6,4 - DIN 9021 A2 groß	2 St.
16	U40 211 11	Halbschale 6,2 ALU schwarz	2 St.

17	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 – ISO 7380 A2	2 St.
18	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	2 St.
19	01 210 83	Hutmutter selbstsichernd M6 – DIN 986 A2	2 St.
20	U40 210 42	Rückenbügel / Handbogen 345mm FM: ?	1 St.
21	U40 211 51	Rohrüberzug ø23	1 St.


Fußbrett

Gruppe 5

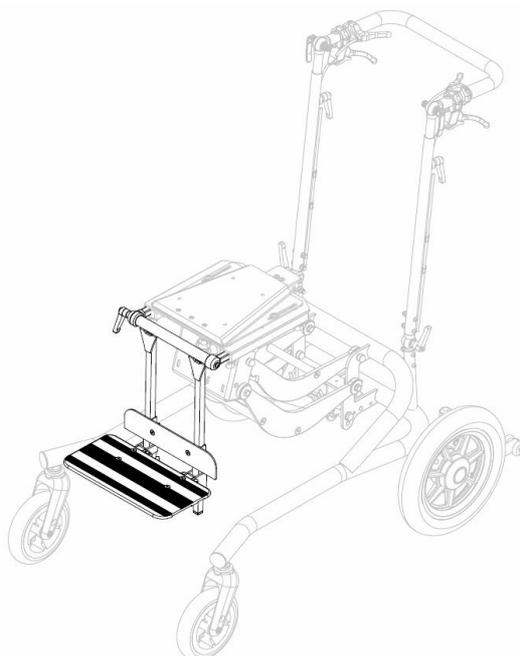

Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Lamellen)


(= CODE M831)

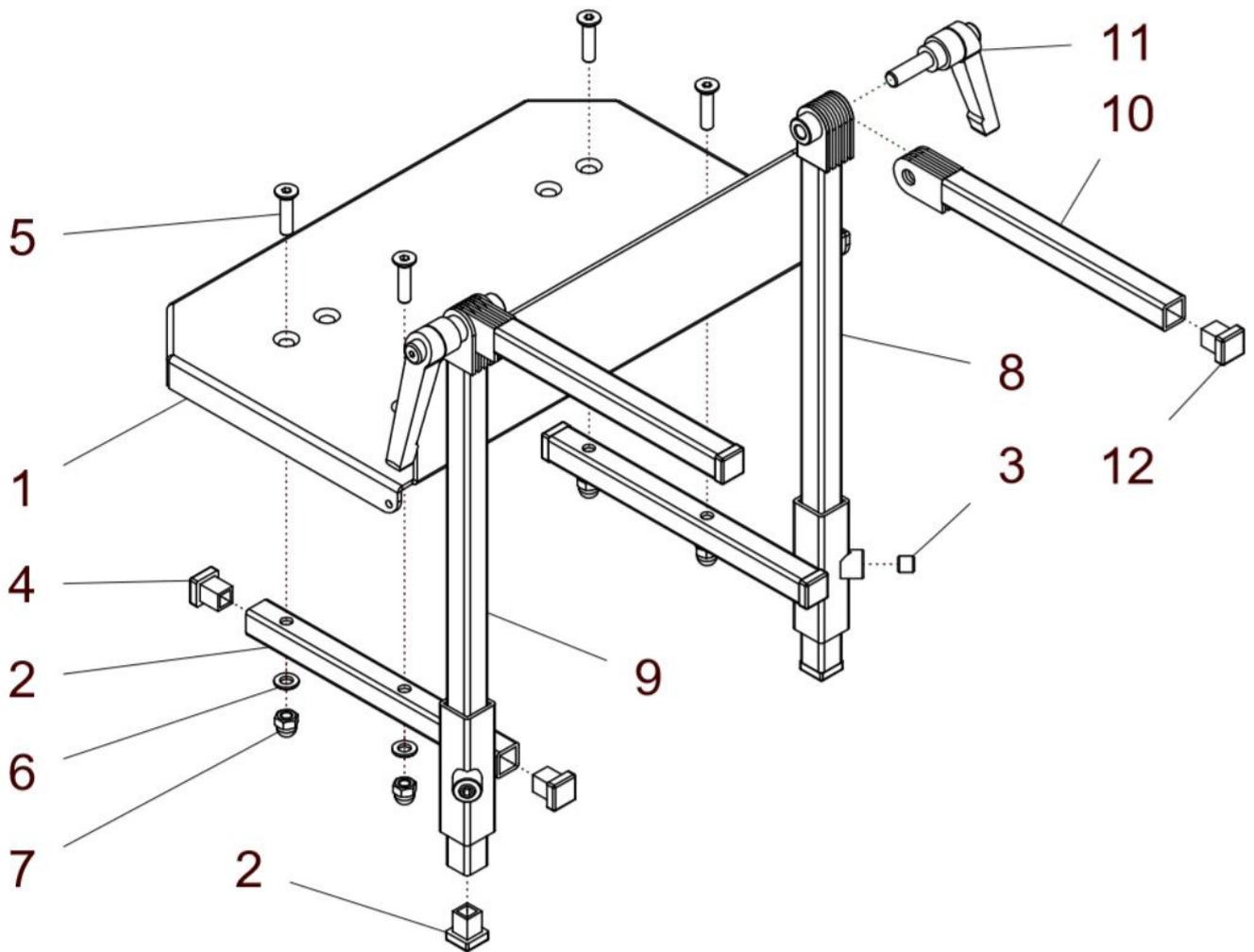

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 12	M70 501 00	Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel Lamellengelenk kpl. mit Kniewinkel 500 / 250	1 St.
1	U40 521 11	Fußbrett durchgehend 300 mit Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	09 990 14	Fußwinkel rechts / links	2 St.
3	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
4	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
5	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
6	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
7	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
8, 10 - 12	U40 522 10	Kniewinkel rechts verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
9 - 12	U40 523 10	Kniewinkel links verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
8	09 990 08	Kniewinkelgelenkstück 500 rechts	1 St.
9	09 990 07	Kniewinkelgelenkstück 500 links	1 St.
10	09 990 06	Kniewinkelgelenkstück 250 ohne Mutter	2 St.
11	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
12	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.

Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Lamellen) und Fußwinkel einstellbar

(= CODE M831 + M832)

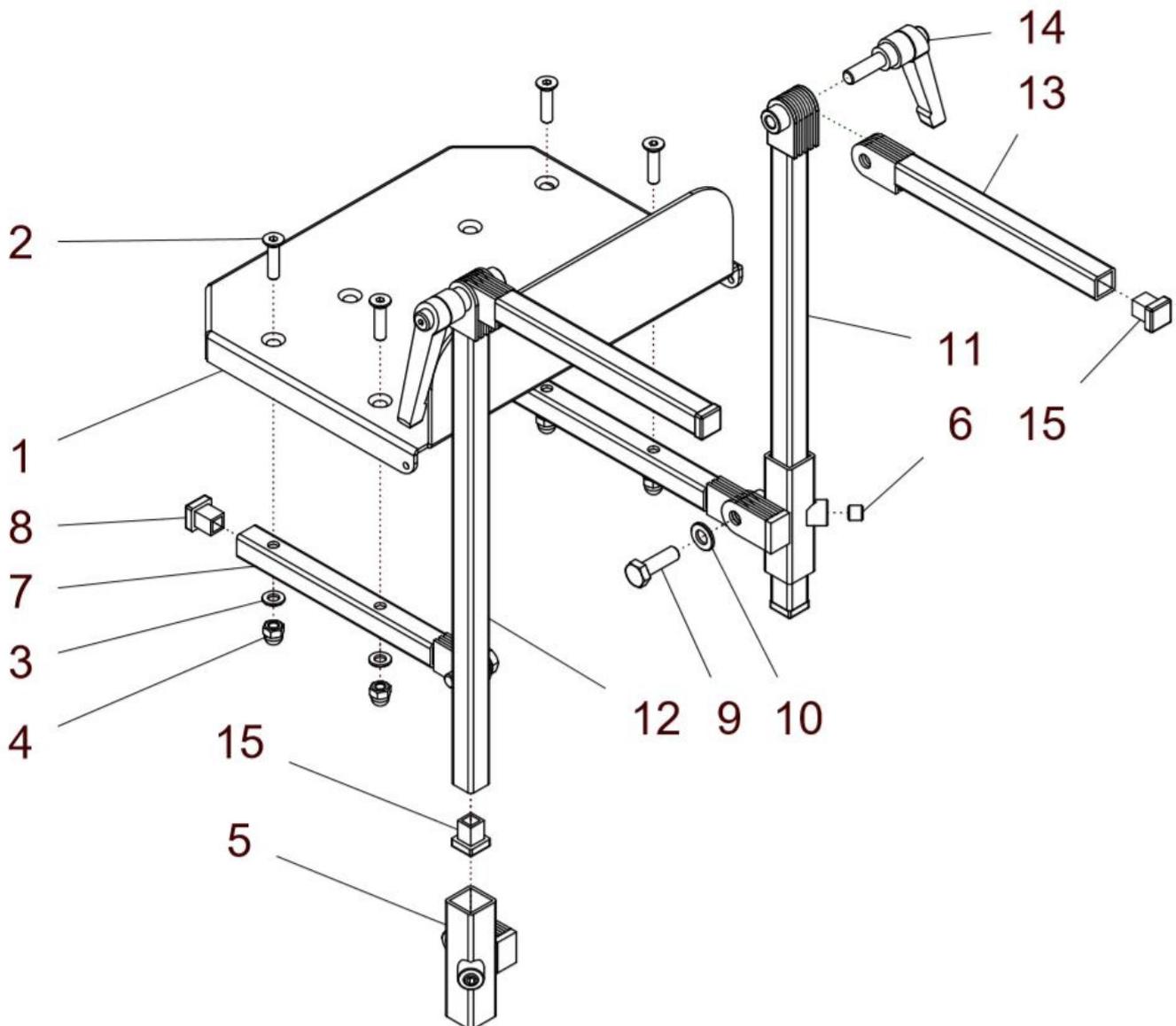


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 15	M70 501 50	Fußbrett durchgehend winkeleinstellbar / Lamellengelenk mit Kniewinkel mit Lamellengelenk und Fußwinkel winkeleinstellbar kpl. mit Kniewinkel 500 / 250	1 St.
1	U40 521 11	Fußbrett durchgehend 300 mit Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
3	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
4	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
5 – 10	U40 525 01	Fußwinkel winkeleinstellbar rechts / links kpl.	2 St.
5	09 990 18	Haltergelenk rechts / links für Fußwinkel verstellbar	2 St.
6	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
7	09 990 20	Fußwinkelgelenkstück 145 rechts / links	2 St.
8	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	2 St.
9	01 113 23	Sechskantschraube M8x25 - DIN 933 vz	2 St.
10	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
11, 13 – 15	U40 522 10	Kniewinkel rechts verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
12 - 15	U40 523 10	Kniewinkel links verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
11	09 990 08	Kniewinkelgelenkstück 500 rechts	1 St.
12	09 990 07	Kniewinkelgelenkstück 500 links	1 St.
13	09 990 06	Kniewinkelgelenkstück 250 ohne Mutter	2 St.
14	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
15	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.

Fußbrett durchgehend hochklappbar mit Kniewinkel (Lamellen)


(ohne Fersenkante)

(= CODE M831 + M835)

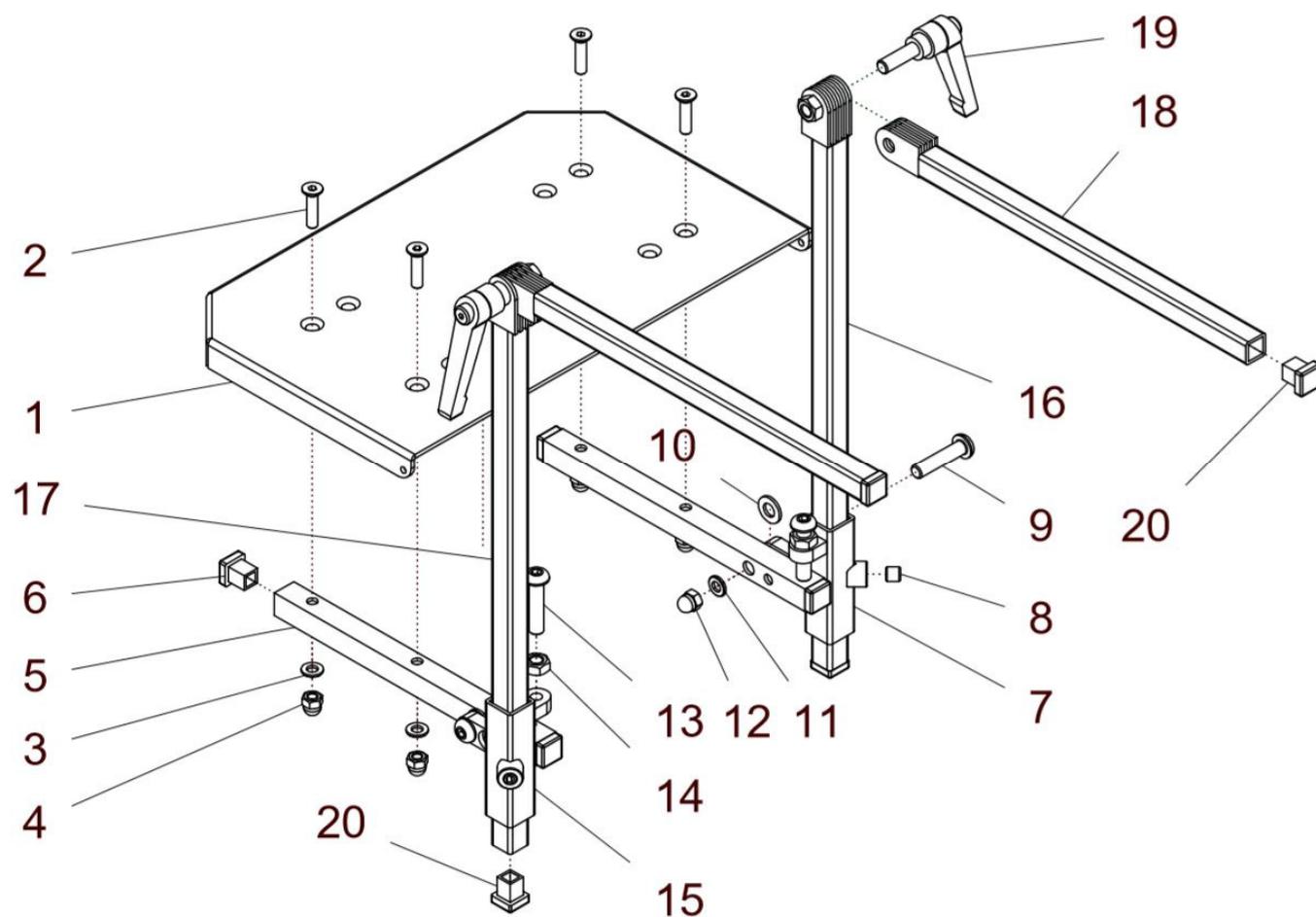

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 20	M70 501 70	Fußbrett durchgehend, hochklappbar mit Kniewinkel mit Lamellengelenk und Fußwinkel hochklappbar kpl. mit Kniewinkel 500 / 250)	1 St.
1 – 15	U40 526 10	Fußbrett durchgehend, hochklappbar mit Fußwinkel hochklappbar (ohne Kniewinkel) kpl.	1 St.
1	U40 526 01	Fußbrett durchgehend 300 hochklappbar ohne Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
3	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
4	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
5 – 14	U40 526 20	Halter für Fußbrett hochklappbar rechts kpl. (ohne Fußbrett / ohne Kniewinkel)	1 St.
5 - 6, 8 - 15	U40 526 30	Halter für Fußbrett hochklappbar links kpl. (ohne Fußbrett / ohne Kniewinkel)	1 St.
5	U40 526 11	Fußbrettrohr für Fußbrett hochklappbar	2 St.
6	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
7	U40 526 21	Halter für Fußbrettrohr rechts	1 St.
8	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913	2 St.
9	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	2 St.
10	01 310 03	Scheibe 8,4 PE - DIN 125	2 St.
11	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 84	Hutmutter M8 - DIN 986	2 St.
13	01 152 43	Linsenkopfschraube M8x40 - ISO 7380	2 St.
14	01 210 14	Mutter M8 - DIN 934	2 St.
15	U40 526 31	Halter für Fußbrettrohr links	1 St.
16, 18 – 20	U40 522 10	Kniewinkel rechts verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
17 - 20	U40 523 10	Kniewinkel links verstellbar 500 / 250 kpl. mit Kniewinkelgelenkstück 500 und 250 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
16	09 990 08	Kniewinkelgelenkstück 500 rechts	1 St.
17	09 990 07	Kniewinkelgelenkstück 500 links	1 St.
18	09 990 06	Kniewinkelgelenkstück 250 ohne Mutter	2 St.
19	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
20	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.


Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Zahnsegment) (= CODE M833)

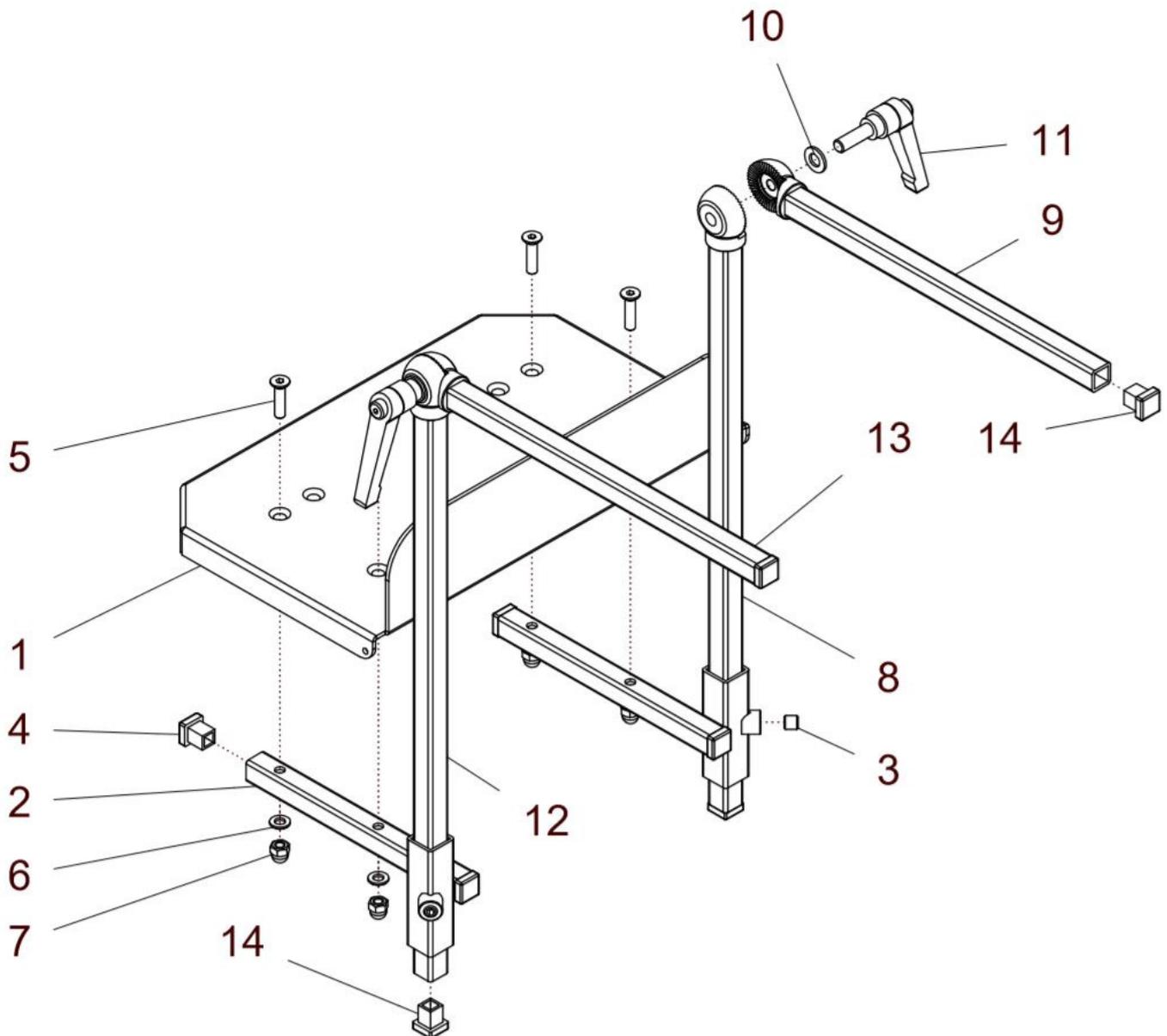

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 14	M70 510 00	Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel mit Zahnsegmente kpl. mit Kniewinkel 400 / 250	1 St.
1	U40 521 11	Fußbrett durchgehend 300 mit Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	09 990 14	Fußwinkel rechts / links	2 St.
3	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
4	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
5	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
6	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
7	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
8 - 11, 14	U25 513 20	Kniewinkel rechts Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
10 - 14	U25 513 30	Kniewinkel links Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
8	U25 213 22	Kniewinkel-Zahnsegment 400 rechts (M8)	1 St.
9	U25 513 21	Kniewinkel-Zahnsegment 250 rechts (Ø8,2)	1 St.
10	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
11	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
12	U25 513 32	Kniewinkel-Zahnsegment 400 links (Ø8,2)	1 St.
13	U25 513 31	Kniewinkel-Zahnsegment 250 links (M8)	1 St.
14	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.

Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Zahnsegment) und Fußwinkel einstellbar

(= CODE M833 + M832)

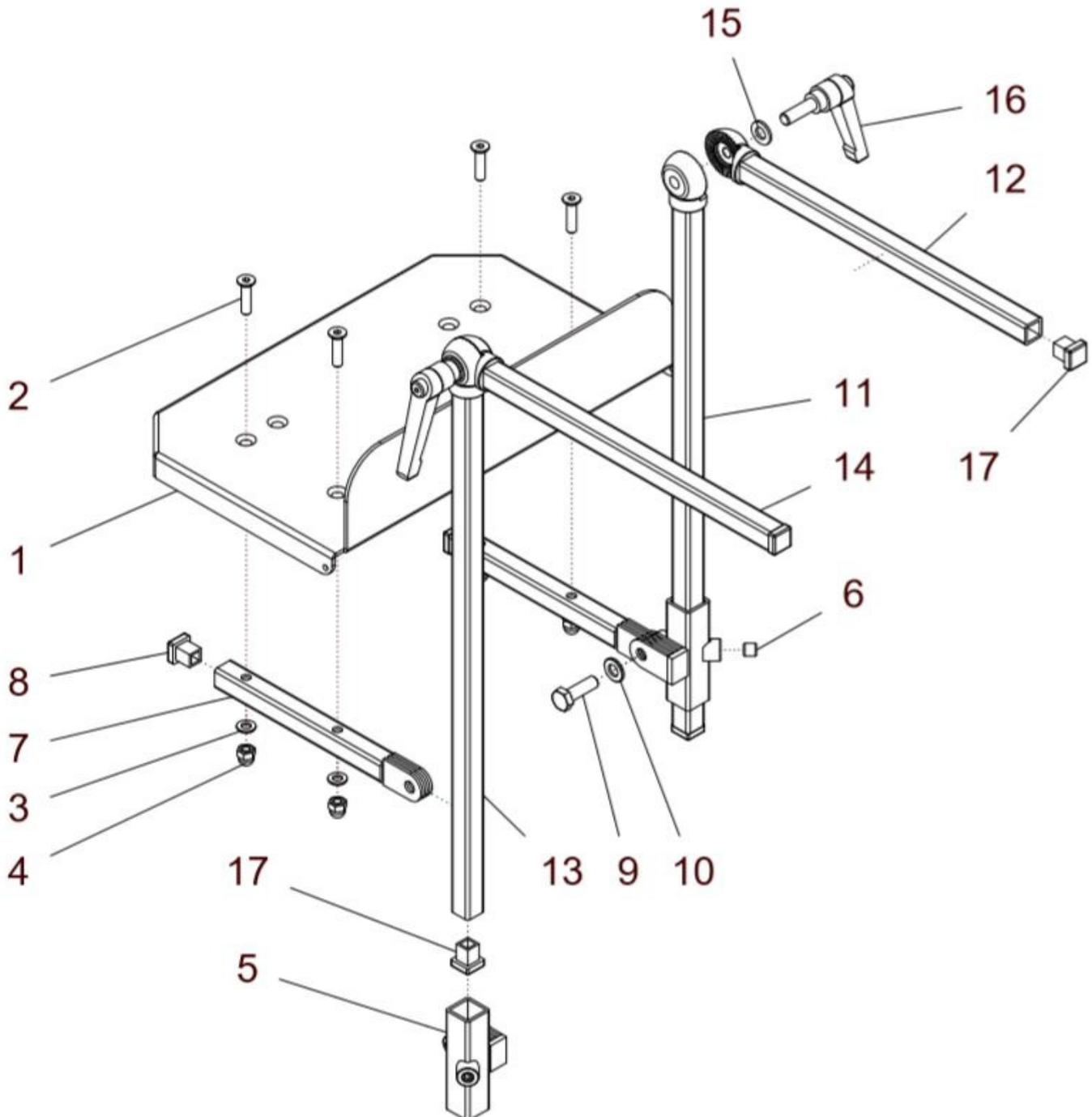


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 17	M70 510 50	Fußbrett durchgehend winkeleinstellbar / Zahnsegment kpl. Mit Kniewinkel mit Zahnsegment und Fußwinkel winkeleinstellbar mit Kniewinkel: ? (400 / 250)	1 St.
1	U40 521 11	Fußbrett durchgehend 300 mit Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
3	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
4	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
5 – 10	U40 525 01	Fußwinkel winkeleinstellbar rechts / links kpl.	2 St.
5	09 990 18	Haltergelenk rechts / links für Fußwinkel verstellbar	2 St.
6	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
7	09 990 20	Fußwinkelgelenkstück 145 rechts / links	2 St.
8	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	2 St.
9	01 113 23	Sechskantschraube M8x25 - DIN 933 vz	2 St.
10	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	2 St.
11, 12, 15 - 17	U25 513 20	Kniewinkel rechts Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
13 - 17	U25 513 30	Kniewinkel links Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
11	U25 213 22	Kniewinkel-Zahnsegment 400 rechts (M8)	1 St.
12	U25 513 21	Kniewinkel-Zahnsegment 250 rechts (Ø8,2)	1 St.
13	U25 513 32	Kniewinkel-Zahnsegment 400 links (Ø8,2)	1 St.
14	U25 513 31	Kniewinkel-Zahnsegment 250 links (M8)	1 St.
15	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
16	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
17	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.

Fußbrett durchgehend hochklappbar mit Kniewinkel (Zahnsegment)



(ohne Fersenkante)

(= CODE M833 + M835)

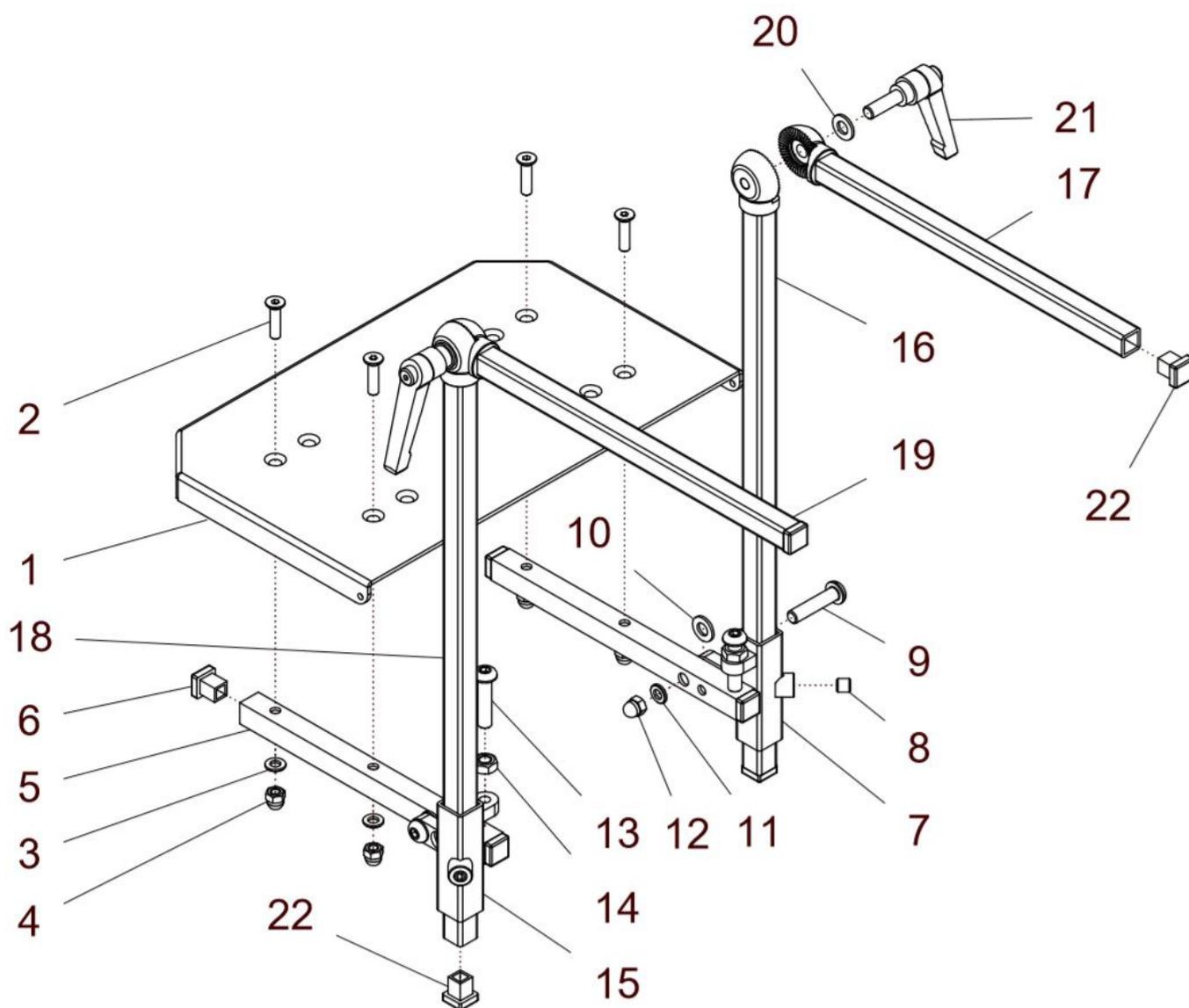



Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 22	M70 510 70	Fußbrett durchgehend hochklappbar mit Kniewinkel mit Zahnsegmente und Fußwinkel mit Kniewinkel 400 / 250) kpl. hochklappbar	1 St.
1 – 15	U40 526 10	Fußbrett durchgehend, hochklappbar mit Fußwinkel hochklappbar (ohne Kniewinkel) kpl.	1 St.
1	U40 526 01	Fußbrett durchgehend 300 hochklappbar ohne Fersenkante (für Kniewinkel)	1 St.
2	01 120 83G	Senkschraube M6x25 - DIN 7991 ZNS	4 St.
3	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	4 St.
4	01 210 73	Hutmutter M6 - DIN 986 ZNS	4 St.
5 – 14	U40 526 20	Halter für Fußbrett hochklappbar rechts (ohne Fußbrett / ohne Kniewinkel) kpl.	1 St.
5 - 6, 8 - 15	U40 526 30	Halter für Fußbrett hochklappbar links (ohne Fußbrett / ohne Kniewinkel) kpl.	1 St.
5	U40 526 11	Fußbrettrohr für Fußbrett hochklappbar	2 St.
6	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
7	U40 526 21	Halter für Fußbrettrohr rechts	1 St.
8	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913	2 St.
9	01 154 42	Linsenkopfschraube M8x35 schwarz - ISO 7380	2 St.
10	01 310 03	Scheibe 8,4 PE - DIN 125	2 St.
11	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
12	01 210 84	Hutmutter M8 - DIN 986	2 St.
13	01 152 43	Linsenkopfschraube M8x40 - ISO 7380	2 St.
14	01 210 14	Mutter M8 - DIN 934	2 St.
15	U40 526 31	Halter für Fußbrettrohr links	1 St.
16, 17, 20 - 22	U25 513 20	Kniewinkel rechts Zahnsegment verstellbar 400 / 250 mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4 kpl.	1 St.
18 - 22	U25 513 30	Kniewinkel links Zahnsegment verstellbar 400 / 250 mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4 kpl.	1 St.
16	U25 213 22	Kniewinkel-Zahnsegment 400 rechts (M8)	1 St.
17	U25 513 21	Kniewinkel-Zahnsegment 250 rechts (Ø8,2)	1 St.
18	U25 513 32	Kniewinkel-Zahnsegment 400 links (Ø8,2)	1 St.
19	U25 513 31	Kniewinkel-Zahnsegment 250 links (M8)	1 St.
20	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125	2 St.
21	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
22	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.

Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Lamellengelenk (= CODE M838)

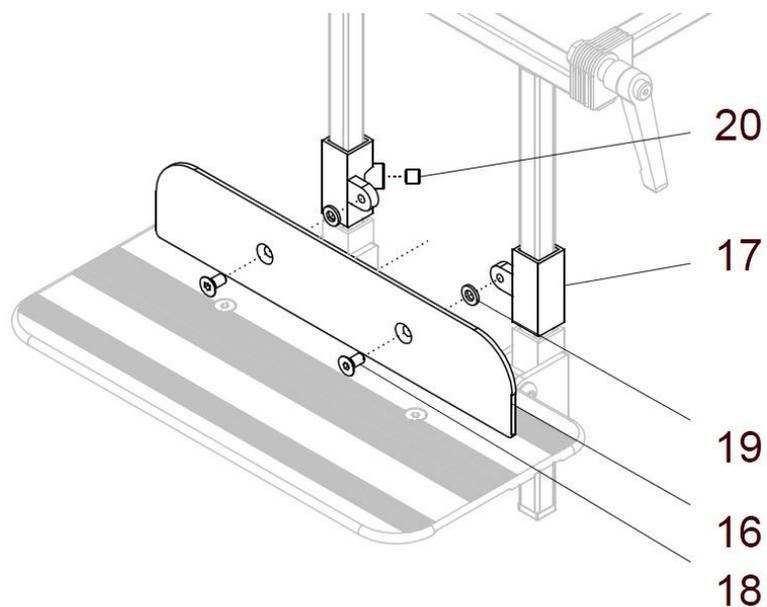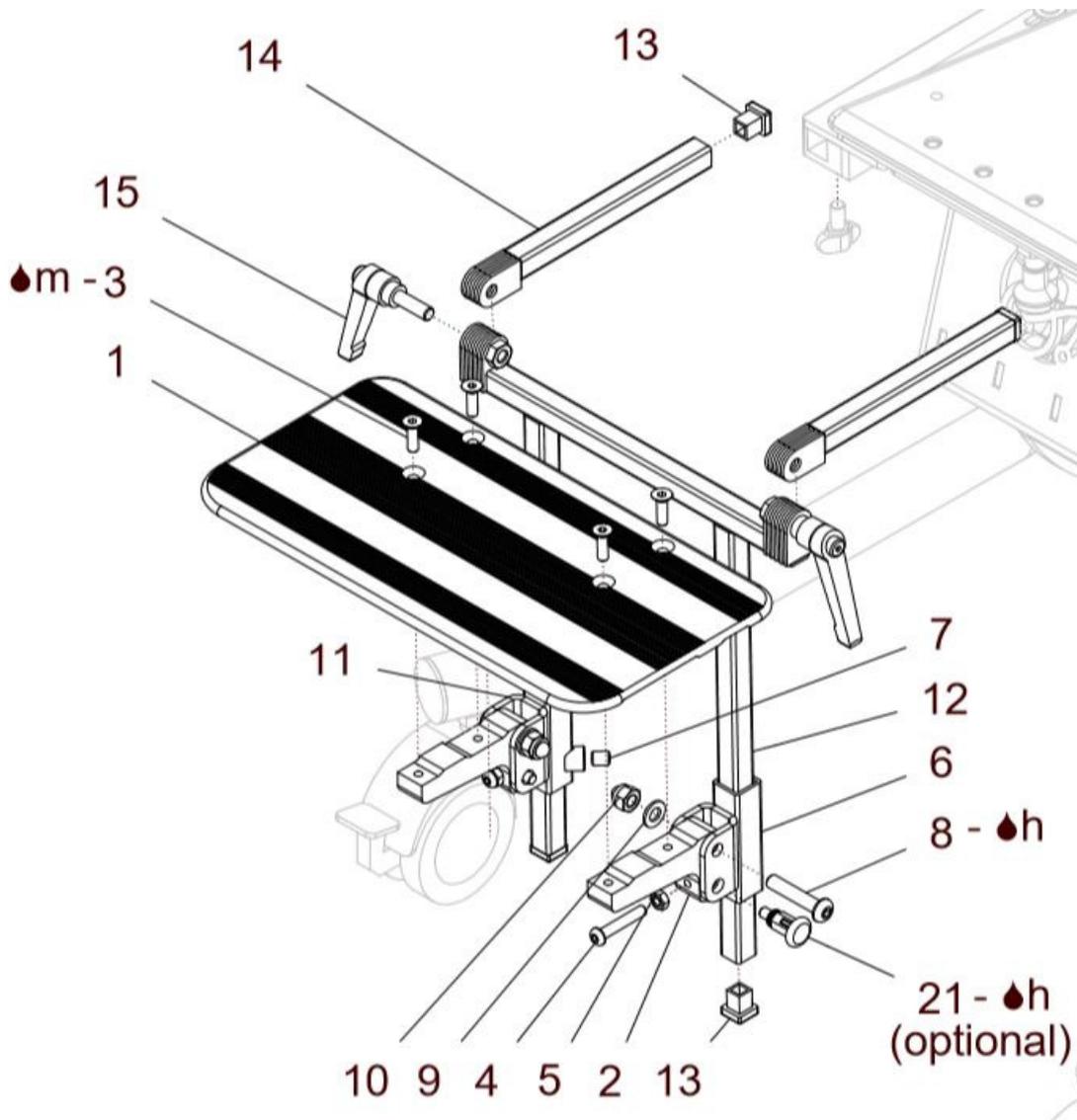

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 20	M70 520 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Kniewinkel mit Kniewinkel Lamellengelenke und Fersenkante kpl.	1 St.
1	U55 555 92	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) (320mm) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
2	U55 555 11	Gelenkblock für Fußbrett-Flachprofil	2 St.
3	01 120 83F	Senkschraube M6x20 - DIN 7991 ZNS	4 St.
4	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380 A2	2 St.
5	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
6 - 10	U53 512 30	Fußbrettgelenk links kpl.	1 St.
6	U53 512 31	Fußbrettgelenk links	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
8	01 154 43	Linsenkopfschraube M8x40 - ISO 7380 zns	2 St.
9	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 zns	2 St.
10	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns	2 St.
7 - 11	U53 512 20	Fußbrettgelenk rechts kpl.	1 St.
11	U53 512 21	Fußbrettgelenk rechts	1 St.
12 - 15	M70 502 20	Kniewinkelaufnahme kpl. mit Kniewinkel-Gelenkstück 150 und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
12	M70 502 21	Kniewinkelaufnahme	1 St.
13	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
14	M61 511 22	Kniewinkelgelenkstück 150mm	1 St.
15	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	2 St.
16 - 20	M70 521 50	Fersenkante für Fußbrett durchgehend FLIP HB kpl. für Fußbrett Fachprofil	1 St.
16	U55 531 12	Fersenkante 280mm	1 St.
17	U55 555 21	Fersenhalter	2 St.
18	01 120 83D	Senkschraube M6x12 - DIN 7991 ZNS	2 St.
19	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
20	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
optional:			
21	01 133 24	Rastbolzen (Zugschnäpper) mit Verriegelung (M10x1)	2 St.


Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Zahnsegment (= CODE M837)

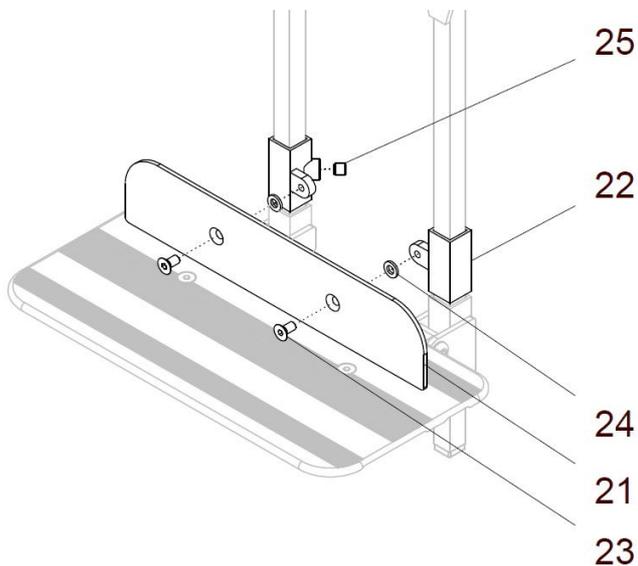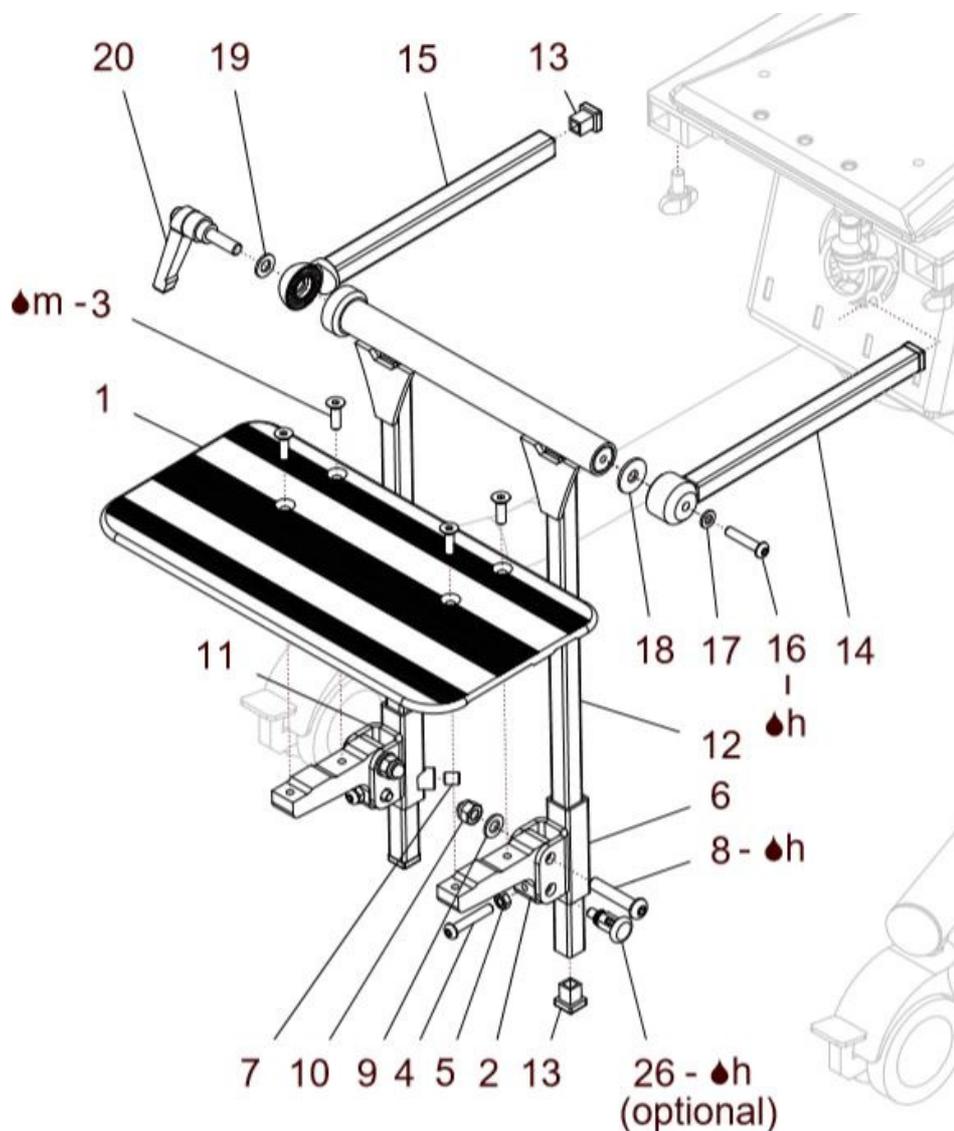

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 25	M70 530 00	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) mit Kniewinkel mit Kniewinkel Zahnsegmente und Fersenkante kpl.	1 St.
1	U55 555 92	Fußbrett durchgehend (Flach-Profil) (320mm) FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
2	U55 555 11	Gelenkblock für Fußbrett-Flachprofil	2 St.
3	01 120 83F	Senkschraube M6x20 - DIN 7991 ZNS	4 St.
4	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380 A2	2 St.
5	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
6 - 10	U53 512 30	Fußbrettgelenk links kpl.	1 St.
6	U53 512 31	Fußbrettgelenk links	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
8	01 154 43	Linsenkopfschraube M8x40 - ISO 7380 zns	2 St.
9	01 320 63	Scheibe 8,4 - DIN 125 zns	2 St.
10	01 210 74	Hutmutter M8 - DIN 986 zns	2 St.
7 - 11	U53 512 20	Fußbrettgelenk rechts kpl.	1 St.
11	U53 512 21	Fußbrettgelenk rechts	1 St.
12 - 20	M70 503 20	Fußbrettaufnahmegelenk kpl. mit Kniewinkel-Gelenkstange und mit Klemmhebel M8x25	1 St.
12	M70 503 21	Gelenkrohr mit Zahnsegment	1 St.
13	04 210 40	Verschlussstopfen 15x15 schwarz	4 St.
14	M70 503 22	Sitztiefgelenk 200mm	1 St.
15	M70 503 23	Gelenkstange ø8,2 rechts	1 St.
16	01 152 24	Linsenkopfschraube M6x30 - ISO 7380 A2	1 St.
17	01 320 02	Scheibe 6,4 - DIN 125 A2	1 St.
18	01 311 03	Scheibe 8,4 - DIN 9021 PE groß	1 St.
19	01 320 03	Scheibe 8,4 - DIN 125 A2	1 St.
20	01 190 02	Klemmhebel Schraube / verstellbar M8x25	1 St.
21 - 25	M70 521 50	Fersenkante für Fußbrett durchgehend FLIP HB kpl. für Fußbrett Fachprofil	1 St.
21	U55 531 12	Fersenkante 280mm	1 St.
22	U55 555 21	Fersenhalter	2 St.
23	01 120 83D	Senkschraube M6x12 - DIN 7991 ZNS	2 St.
24	01 320 62	Scheibe 6,4 - DIN 125 ZNS	2 St.
25	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913 vz	2 St.
optional:			
26	01 133 24	Rastbolzen (Zugschnäpper) mit Verriegelung (M10x1)	2 St.


Fußbrett geteilt (Flach-Profil) mit Zahnsegment

(= CODE 836)

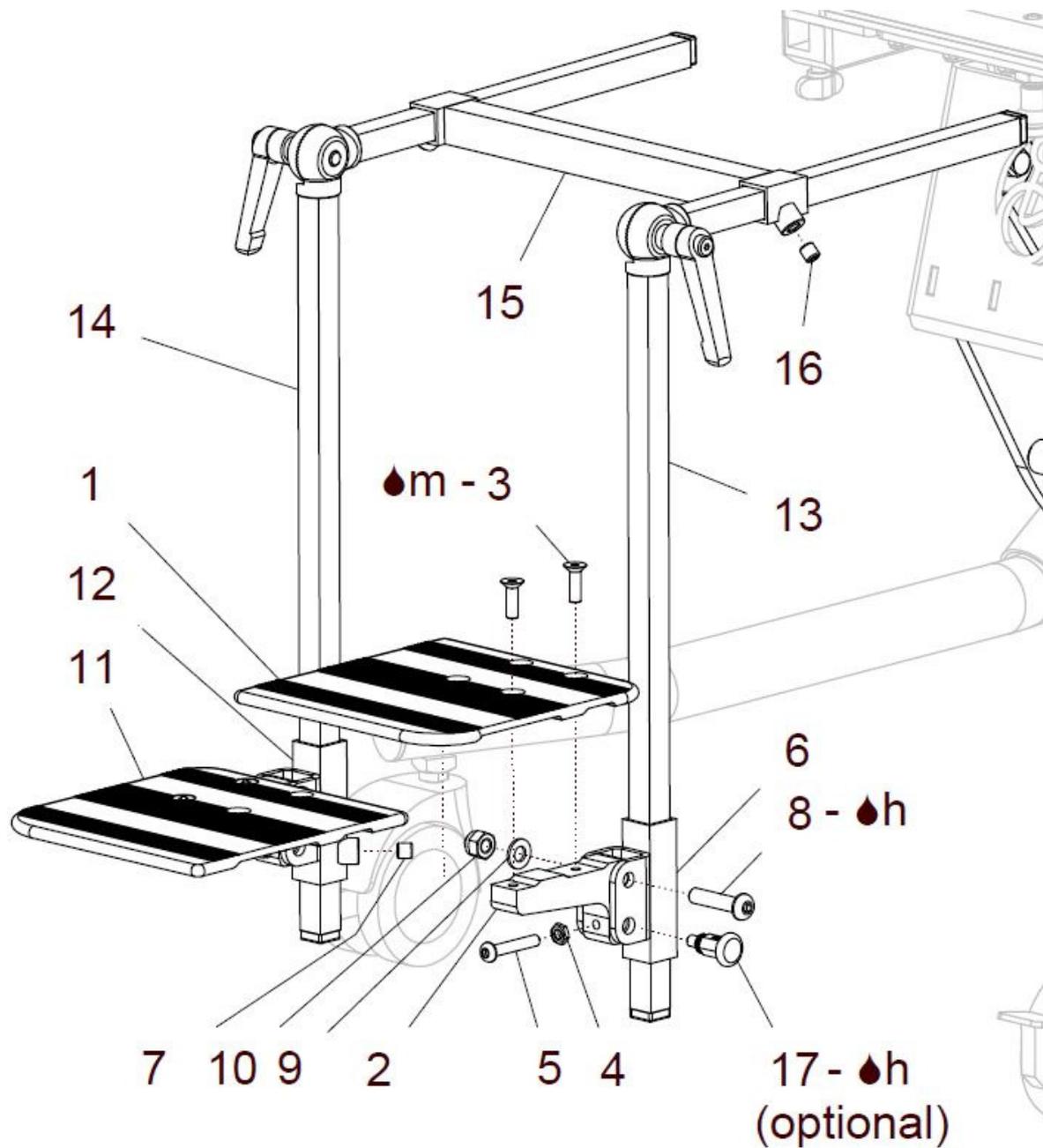

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 16	M70 540 00	Fußbrett geteilt (Flach-Profil) mit Kniewinkel Zahnsegm. mit Kniewinkel Zahnsegmente und mit Stabilisierung kpl. mit Kniewinkel 400 / 250	1 Paar
1 – 10, 13	M70 540 30	Fußbrett geteilt links (Flach-Profil) mit Kniewinkel Zahnsegm. mit Kniewinkel Zahnsegmente kpl. (ohne Stabilisierung) mit Kniewinkel 400 / 250	1 St.
1 – 10	M70 541 30	Fußbrett geteilt links (Flach-Profil) mit Gelenk kpl. (ohne Kniewinkel)	1 St.
1	M70 541 31	Fußbrett geteilt links (Flach-Profil) 153mm FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
2	U55 555 11	Gelenkblock für Fußbrett-Flachprofil	2 St.
3	01 120 83F	Senkschraube M6x20 schwarz - DIN 7991 zns	4 St.
4	01 210 13	Mutter M6 - DIN 934 vz	2 St.
5	01 152 25	Linsenkopfschraube M6x35 - ISO 7380 A2	2 St.
6 – 10	U53 512 30	Fußgelenk links kpl.	1 St.
6	U53 512 31	Fußbrettgelenk links	1 St.
7	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913	2 St.
8	01 154 43	Linsenkopfschraube M8x40 schwarz - ISO 7380 zns	2 St.
9	01 320 63	Scheibe 8,4 schwarz - DIN 125 zns	2 St.
10	01 210 74	Hutmutter M8 schwarz - DIN 986 zns	2 St.
2 – 5, 7 – 12, 14	M70 540 20	Fußbrett geteilt rechts (Flach-Profil) mit Kniewinkel Zahnseg. mit Kniewinkel Zahnsegmente kpl. (ohne Stabilisierung) mit Kniewinkel: 400 / 250	1 St.
7 – 12	M70 541 20	Fußbrett geteilt rechts (Flach-Profil) mit Gelenk kpl. (ohne Kniewinkel)	1 St.
11	M70 541 21	Fußbrett geteilt rechts (Flach-Profil) 153mm FM: schwarz matt feinstruktur	1 St.
7 – 10, 12	U53 512 20	Fußgelenk rechts kpl.	1 St.
12	U53 512 21	Fußbrettgelenk rechts	1 St.
13	U25 513 30	Kniewinkel links Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
14	U25 513 20	Kniewinkel rechts Zahnsegment verstellbar 400 / 250 kpl. mit Kniewinkel-Zahnsegment 400 und 250, Klemmhebel M8x25 u. Scheibe ø8,4	1 St.
15 – 16	M70 541 10	Kniewinkel-Führung Flip HB / Floh HB kpl.	1 St.
15	M70 541 11	Kniewinkel-Führung Flip HB / Floh HB	1 St.
16	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913	2 St.
optional:			
17	01 133 24	Rastbolzen (Zugschnäpper) mit Verriegelung (M10x1)	2 St.


Fersenkante für Fußbrett geteilt

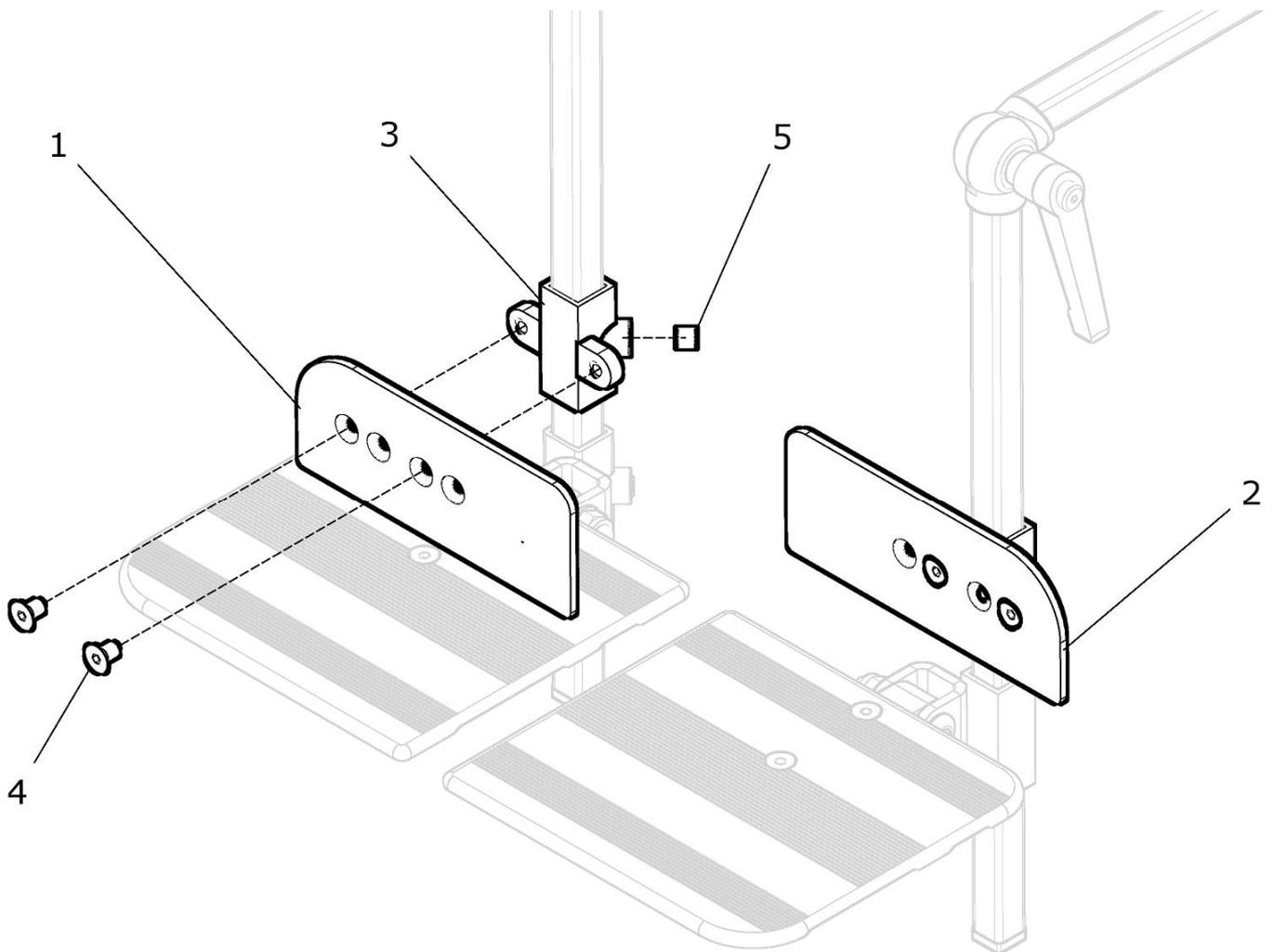


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 5	M70 545 00	Fersenkanten geteilt für Fußbrett geteilt kpl.	1 Paar
2 - 5	M70 545 20	Fersenkante geteilt rechts für Fußbrett geteilt rechts kpl.	1 St.
1, 3 - 5	M70 545 30	Fersenkante geteilt links für Fußbrett geteilt links kpl.	1 St.
1	U55 565 33	Fersenkante für FB geteilt links 150mm	1 St.
2	U55 565 23	Fersenkante für FB geteilt rechts 150mm	1 St.
3	U55 565 41	Fersenthalter für FB geteilt	2 St.
4	01 120 83D	Senkschraube M6x12 schwarz - DIN 7991	4 St.
5	01 131 47	Gewindestift M8x10 - DIN 913	2 St.

Räder

Gruppe 6

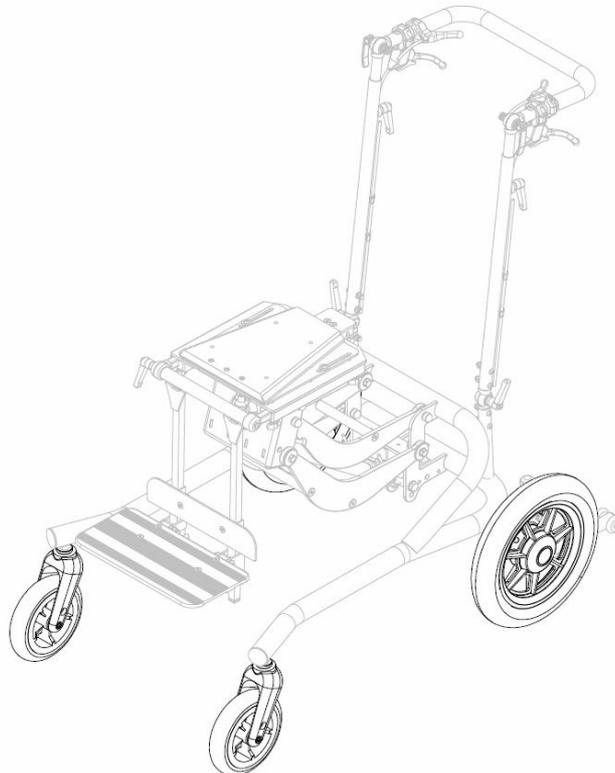


Antriebsrad Trommelbremse 12" luftbereift

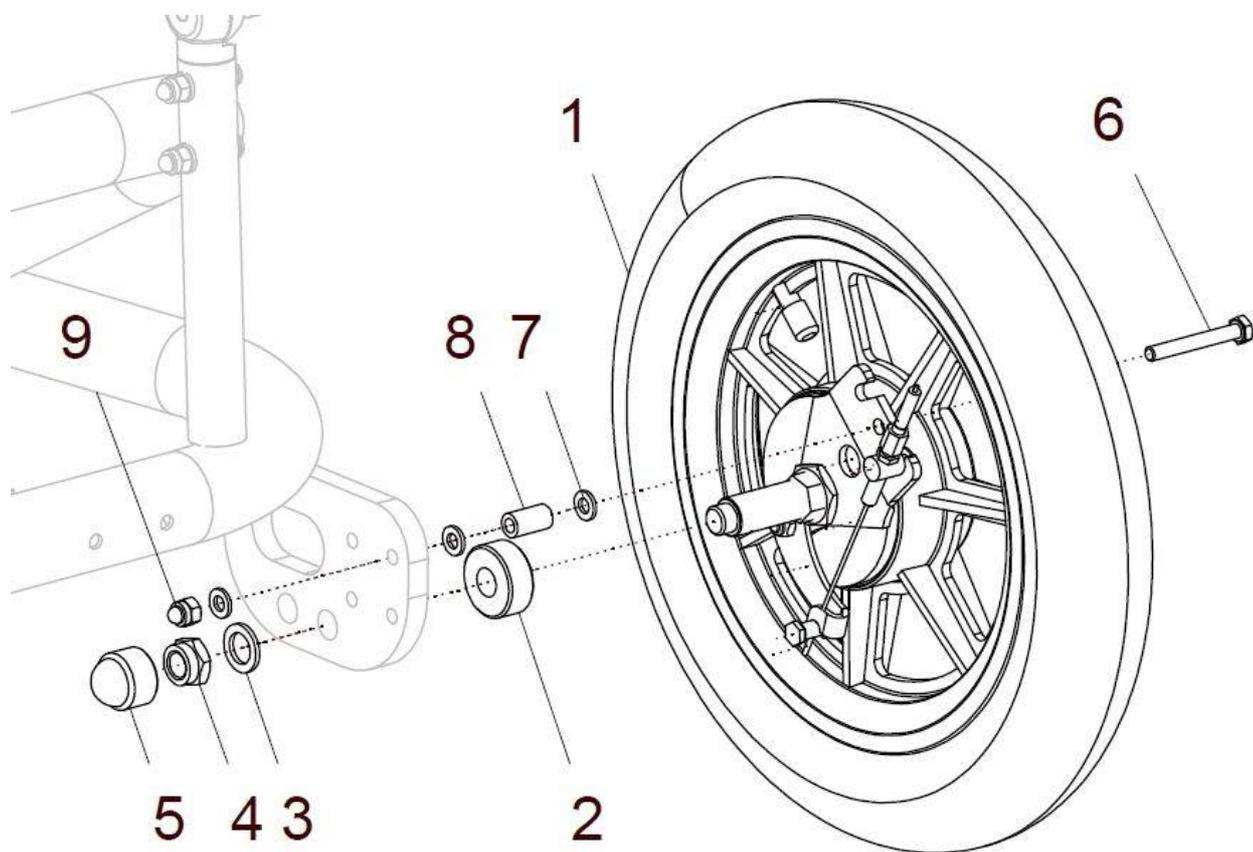

Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 9	M80 620 00	Antriebsrad 12" grau mit Trommelbremse B2 kpl. luftbereift 1/2 x 2 1/4 mit grauer Decke mit Schraubachse M12	1 Paar
1a - 9	M80 620 20	Antriebsrad 12" grau mit Trommelbremse B2 rechts kpl. luftbereift 1/2 x 2 1/4 mit grauer Decke mit Schraubachse M12 rechts	1 St.
1b - 9	M80 620 30	Antriebsrad 12" grau mit Trommelbremse B2 links kpl. luftbereift 1/2 x 2 1/4 mit grauer Decke mit Schraubachse M12 links	1 St.
1a	05 112 22	Antriebsrad 12" Trommelbremse rechts luftbereift 12x1/2 x 2 1/4 mit grauer Decke (Hebel rechts) mit Schraubachse M12	1 St.
1b	05 112 23	Antriebsrad 12" Trommelbremse links luftbereift links 12x1/2 x 2 1/4 mit grauer Decke (Hebel links) mit Schraubachse M12	1 St.
2	U43 640 21	Buchse 12,5mm	2 St.
3	01 321 35	Scheibe - 13 - ISO 7092 vz	2 St.
4	01 210 06	Mutter - M12 - DIN 985 A2	2 St.
5	04 211 06	KU-Abdeckkappe - M12 - SW19	2 St.
6	01 112 37	Sechskantschraube - M6x45 - DIN 931 vz	2 St.
7	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125 A2	6 St.
8	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	2 St.
9	01 210 03	Hutmutter - M6 - DIN 986 A2	2 St.


Lenkräder

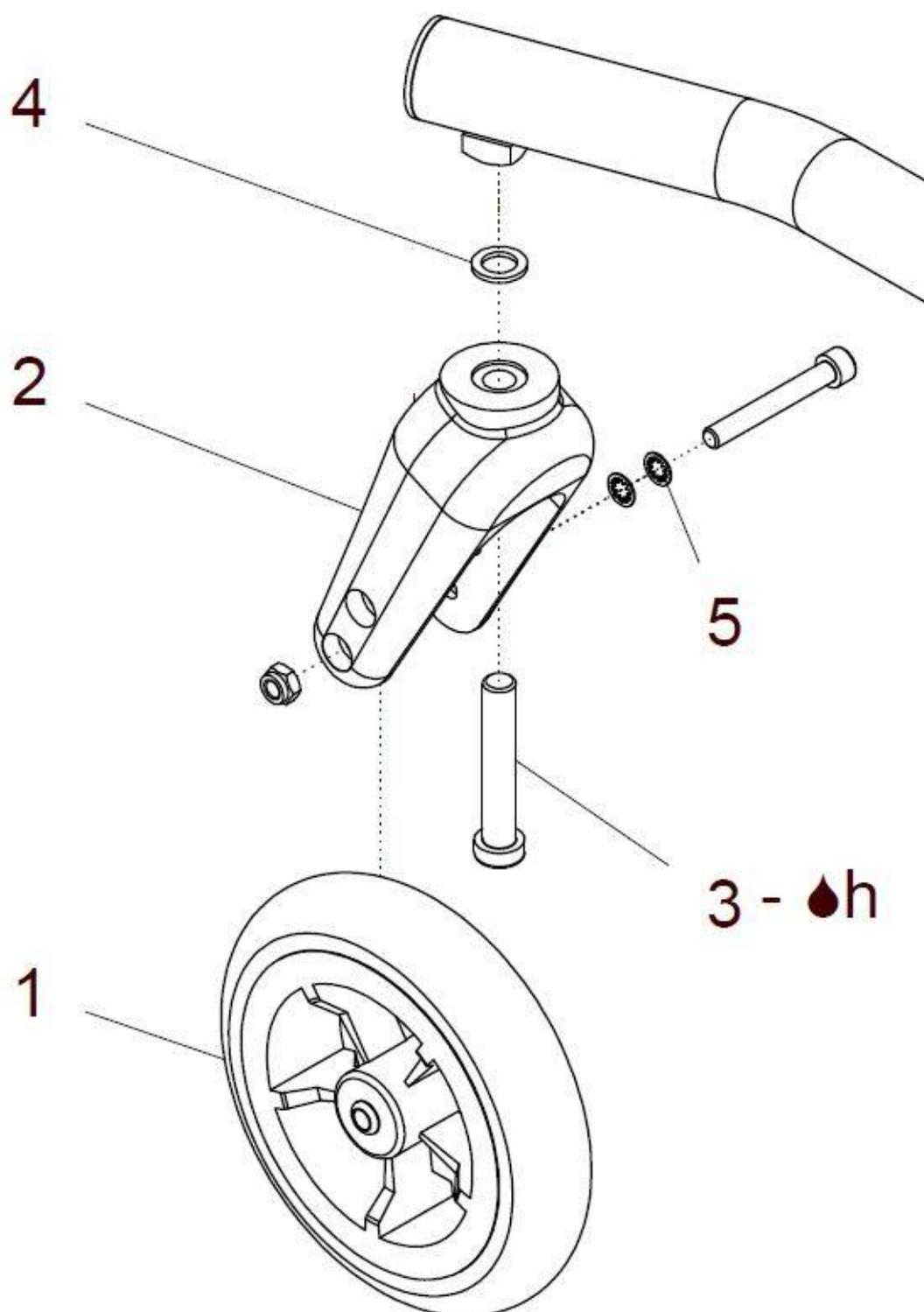

Lenkrad 7" luftbereift / 7" Vollgummi

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1a - 5	M80 640 00	Lenkrad 7" Vollgummi mit Kunststoffgabel FLOH kpl. und mit Befestigung	1 St.
1a	05 201 05	Lenkrad 7" Vollgummi	1 St.
2	90 648 14	Lenkradgabel Kunststoff 60x142 m. Schraube M8x75 u. Mutter M8	1 St.
3	01 161 65	Zylinderkopfschraube - M12x50 - DIN 6912 vz	1 St.
4	01 328 11	Passscheibe 13mm - DIN 988	1 St.
5	01 330 02	Schnorr-Scheibe NM 8	2 St.
1b - 5	M80 640 05	Lenkrad 7" luftbereift mit Kunststoffgabel FLOH kpl. und mit Befestigung	1 St.
1b	05 202 02	Lenkrad 7" luftbereift	1 St.


Umbausatz Radstandsverlängerung

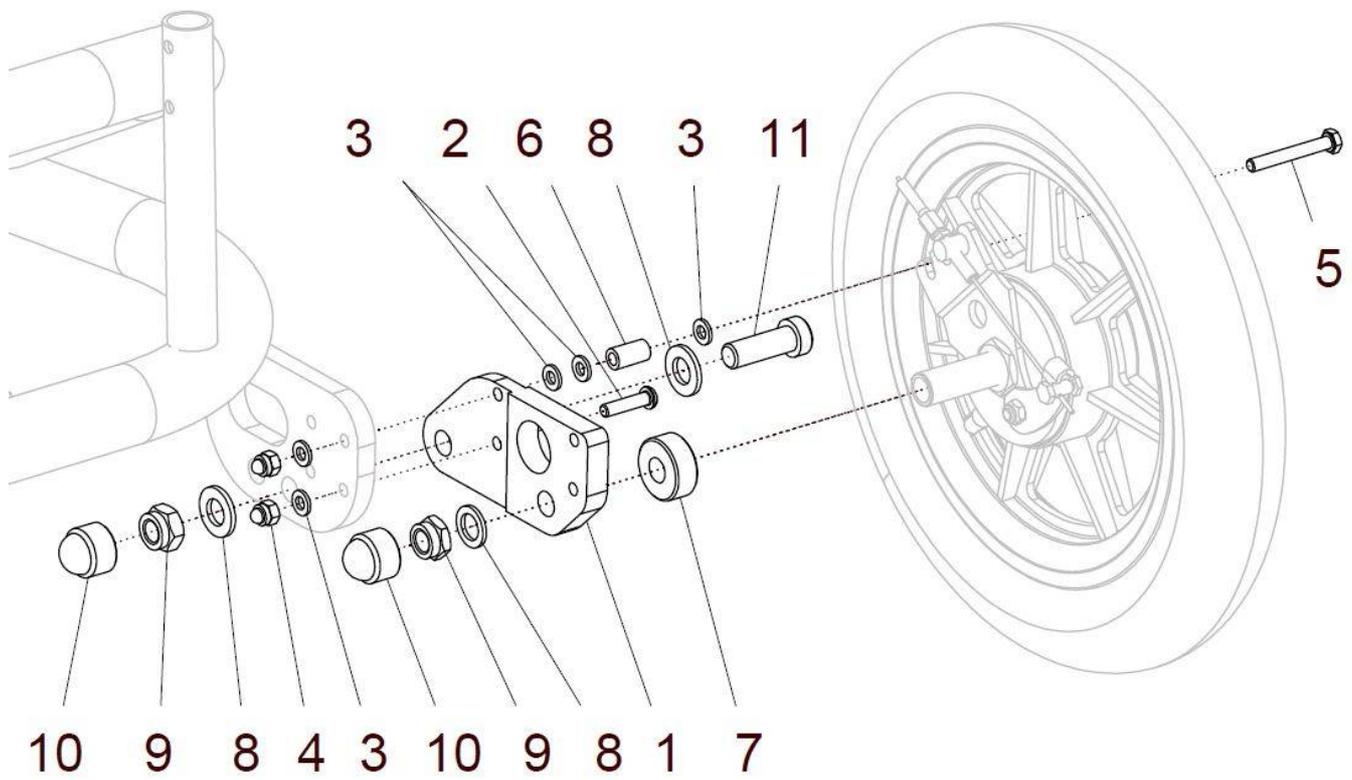


Pos.- Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 - 11	M80 621 00	Radstandsverlängerung kpl. Platte mit Befestigungsteile	2 St.
1	M81 621 11	Radstandsverlängerungsplatte Floh HB / Floh LT	2 St.
2	01 152 23	Linsenkopfschraube - M6x25 – ISO 7380 A2	2 St.
3	01 320 02	Scheibe - 6,4 - DIN 125 A2	10 St.
4	01 210 03	Hutmutter - M6 - DIN 986 A2	4 St.
5	01 112 39	Sechskantschraube - M6x55 - DIN 931 vz	2 St.
6	50 661 16	Distanzröllchen 18mm	2 St.
7	U43 640 21	Buchse 12,5mm	2 St.
8	01 321 35	Scheibe - 13 - ISO 7092 vz	6 St.
9	01 210 06	Mutter - M12 - DIN 985 A2	4 St.
10	04 211 06	KU-Abdeckkappe - M12 - SW19	4 St.
11	01 161 62	Zylinderkopfschraube - M12x35 - DIN 6912 vz	2 St.

Bremse

Gruppe 7

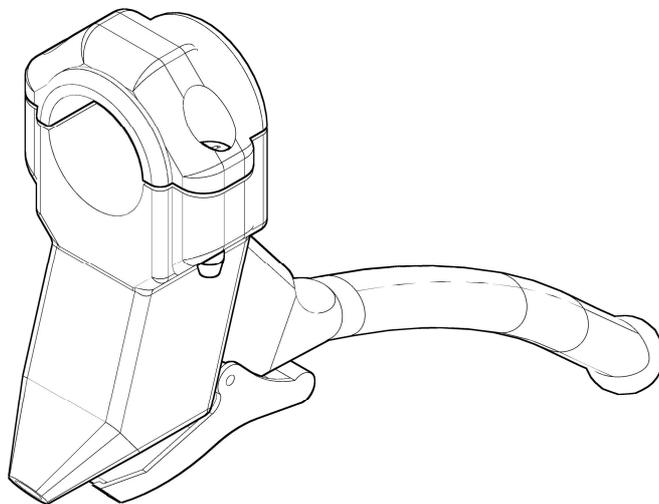

Bremsgriffe für Trommelbremsen

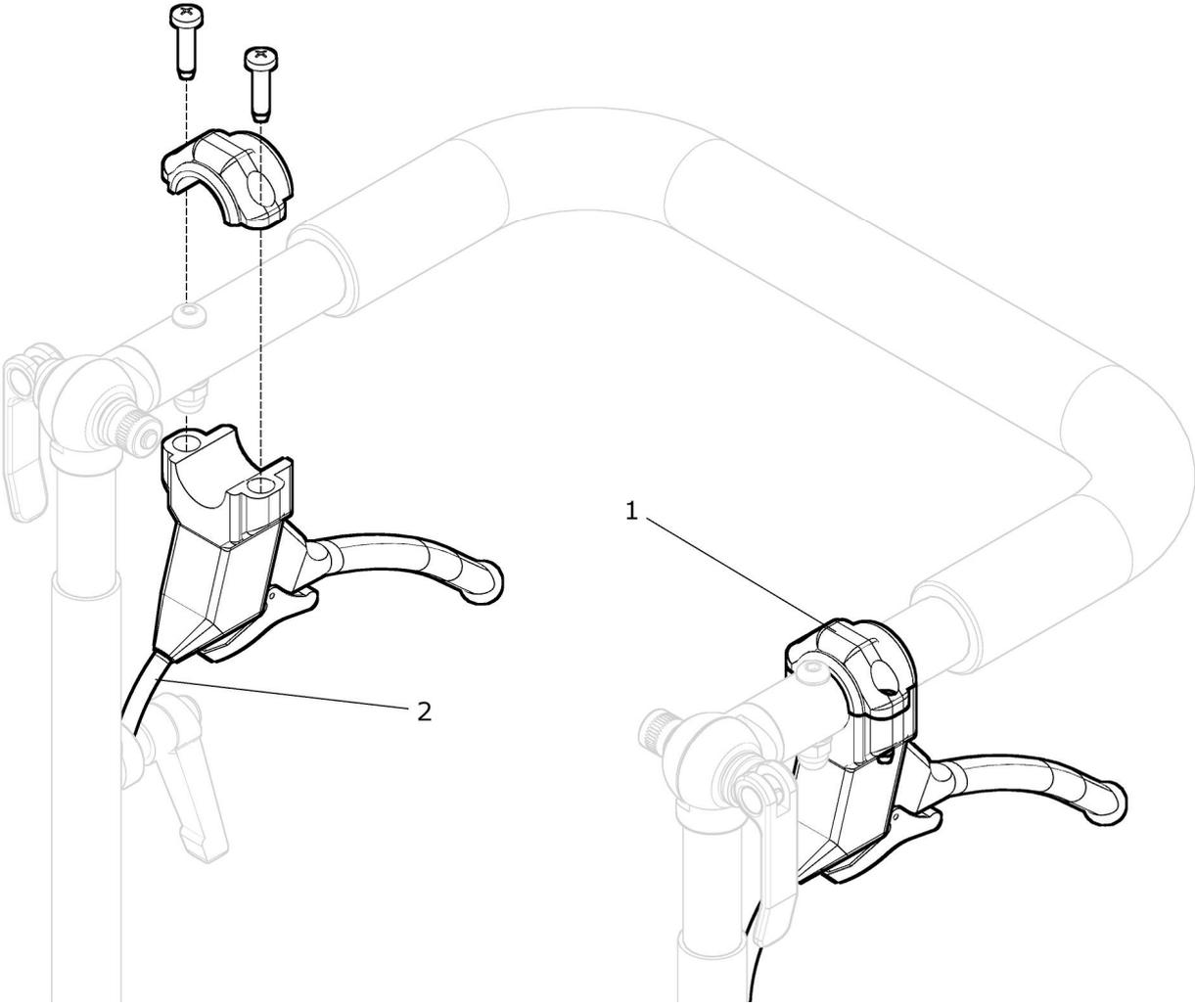

Pos.-Nr.	Artikelnummer	Benennung	Menge
1 – 2	M80 710 00	Bremsgriff einzeln für 12“-Trommelbremse mit Bowdenzug kpl.	2 St.
1	05 401 05	Bremsgriff für Trommelbremse	2 St.
2	U40 713 50	Bowdenzug für 12“-Trommelbremse mit Hülle und Verstellelement kpl.	2 St.

