

Sicherheitstechnische Kontrolle

Produkt : _____

Baujahr: _____

Serien-Nr. : _____

Kommission/Patient : _____

Für den Wiedereinsatz von unseren Stehgeräten empfehlen wir eine grundsätzliche Überprüfung des Produktes durch einen sachkundigen Fachhändler.

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produktes mit Hilfe der Gebrauchsanweisung vertraut. Reinigen Sie das Produkt gemäß den Reinigungsangaben in der Gebrauchsanweisung und beachten Sie ggf. die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Pflegeanweisungen und produktspezifische Prüfanweisungen.

Prüfung	OK	Bemerkung
---------	----	-----------

Optische Kontrolle

- Produkt auf Sauberkeit prüfen ggf. gründlich reinigen oder desinfizieren		
- Kontrolle des Oberflächenschutzes verchromte Teile pulverbeschichtete Teile		
- Rahmen, Mittelsäulen und tragende Teile auf Beschädigungen prüfen		
- Pelotten und Bezüge reinigen und/oder desinfizieren ggf. die Bezüge wechseln !!!!!!!		
- Fehlende Kappen und Stopfen		
- Elektrische Leitungen ohne Beschädigungen		
- Ladegerät vorhanden und ohne Beschädigung		

Mechanische Kontrolle

- alle Schraub- und Klemmverbindungen prüfen und nachziehen		
- Verriegelungselemente auf Funktion und Vollständigkeit überprüfen		
- Gasdruckfeder für Verstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen		

- Pelotten, Pelotten-Polster und Bezüge auf Beschädigungen prüfen		
- Bowdenzüge auf Funktion und Zustand prüfen		
- Gurte und Gurthose von Gurtaufroller in Ordnung		
- Fußschalen in Ordnung		
- Kniepelotten in Ordnung		
- Beckenpelotten in Ordnung		
- Spinenpelotten in Ordnung		
- Brustpelotte in Ordnung		
- Seitenpelotten in Ordnung		
- Rückenpelotten in Ordnung		
- Kopfstütze /-pelotte in Ordnung		
- Scherenbeckenrahmenn in Ordnung auf Funktion und Zustand prüfen / Verschluß / Sicherung prüfen		
- Schwenkbeckenrahmenn in Ordnung auf Funktion und Zustand prüfen / Verschluß / Sicherung prüfen / Kette vorhanden		

Handhabung

- Funktion der Winkelverstellung prüfen (optional) (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- Funktion der Höhenverstellung prüfen (optional) (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- Bowdenzüge in Ordnung?		
- Pelotten -> Verstellung bzw. Einstellbarkeit prüfen		
- Tischplatte auf Verstellung/ Winkelverstellung prüfen		
- Gurte von elektrischem Gurtaufroller prüfen		
- Transportrollen Funktion / Bremsen prüfen		
- Schwenkbereich der Transport überprüfen		
- Tischplatte prüfen		
- verstellbare Armauflagen prüfen		
- Tischumrandung prüfen		
- Schrägverstellung prüfen		
- Tischtiefenverstellung prüfen		

Endprüfung

- Allgemeine Prüfung des Gesamtsystems mit Patienten (nur mit mindestens 2 Personen)		
- Einstellung der Pelotten prüfen		
- Dokumentation (Gebrauchsanweisung) ggf. unter www.berollka-aktiv.de downloaden		
- sind alle Aufkleber (insbesondere der Serien-Nr.) vorhanden und gut lesbar		

**Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgeführt werden!**

Das Hilfsmittel ist zur Auslieferung freigegeben!

Freigabe: durch (Name): _____

Datum: _____ Unterschrift _____