

## Sicherheitstechnische Kontrolle

Produkt : \_\_\_\_\_

Baujahr: \_\_\_\_\_

Serien-Nr. : \_\_\_\_\_

Kommission/Patient : \_\_\_\_\_

Für den Wiedereinsatz von unseren Rollstühlen empfehlen wir eine grundsätzliche Überprüfung des Produktes durch einen sachkundigen Fachhändler.

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produktes mit Hilfe der Gebrauchsanweisung vertraut. Reinigen Sie das Produkt gemäß den Reinigungsangaben in der Gebrauchsanweisung und beachten Sie ggf. die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Pflegeanweisungen und produktspezifische Prüfanweisungen.

Prüfung	OK	Bemerkung
---------	----	-----------

### Optische Kontrolle

- Produkt auf Sauberkeit prüfen ggf. gründlich reinigen oder desinfizieren		
- Kontrolle des Oberflächenschutzes: - verchromte Teile - pulverbeschichtete Teile		
- Rahmen und Bauteile auf Beschädigungen prüfen		
- Schiebebügelbezüge auf Beschädigungen und hygienische Zustände überprüfen, reinigen und/oder ggf. ersetzen		

### Mechanische Kontrolle

- alle Schraub- und Klemmverbindungen prüfen und nachziehen		
- Verriegelungselemente auf Funktion und Vollständigkeit überprüfen		
- Gasdruckfeder für Rückenwinkelverstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen		
- Gasdruckfeder für Sitzwinkelverstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen		
- Bowdenzüge auf Funktion und Zustand prüfen		
- Armlehnen auf Zustand und Verstellbarkeit prüfen		
- Sichere Befestigung der Brems- und Schiebegriffe prüfen		

- rastet der Sicherungs- bzw. Arretierbolzen bei der Verbindung von Trapezadapterober- & unterteil ein?		
- Trapezadapteroberenteil frei von Beschädigungen?		
- Trapezadapterunterteil frei von Beschädigungen?		

## Rad und Bremsen

- Luftdruck aller Reifen prüfen		
- Laufdecke auf vorhandenes Profil prüfen		
- Funktion der Trommelbremse prüfen		
- Bowdenzüge in Ordnung?		
- Steckachse spielfrei / leichtgängig? reinigen und leicht einfetten		
- Verriegelungskugeln der Steckachse auf Gängigkeit prüfen		
- Greifringe auf Oberflächenzustand & festen Sitz prüfen		
- Rad-Rundlauf prüfen		
- Rad- und Laufgeräusche prüfen (Kugellager in Ordnung?)		
- Radsturzeinstellung prüfen		
- Senkrechte Lenkradgabelachse der Vorderräder prüfen		
- Schwenkbereich der Lenkräder überprüfen		
- Speichen der Antriebsräder locker?		
- Speichenreflektoren vorhanden?		
- Einstellung der Kniehebelbremse prüfen		

## Handhabung

- ggf. Funktion der Faltbarkeit prüfen (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- ggf. Funktion der Sitzkantelung prüfen (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- ggf. Funktion der Rückenverstellung prüfen (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- ggf. das Abklappen des Rückens prüfen		

## Fahrttest

- Spurverhalten / Geradeauslauf prüfen		
- Feststellbremsen prüfen		
- Kippsicherheit überprüfen		

## Wartung

- sich bewegende Teile sowie Lager schmieren / ölen		
---	--	--

## Endprüfung

- Allgemeine Prüfung des Gesamtsystems mit Insasse		
- Einstellung der Kippsicherungen ggf. anpassen		
- Luftdruck der Räder ggf. anpassen		
- liegt die Gebrauchsanweisung bei? (ggf. unter <a href="http://www.berollka.de">www.berollka.de</a> downloaden)		
- sind alle Aufkleber (insbesondere der Serien-Nr.) vorhanden und gut lesbar?		

**Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden!**

---

**Das Hilfsmittel ist zur Auslieferung freigegeben!**

**Freigabe:** durch (Name): \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_      Unterschrift \_\_\_\_\_