

Sicherheitstechnische Kontrolle

Produkt : _____

Baujahr: _____

Serien-Nr. : _____

Kommission/Patient : _____

Für den Wiedereinsatz von unseren Rollstühlen empfehlen wir eine grundsätzliche Überprüfung des Produktes durch einen sachkundigen Fachhändler.

Machen Sie sich mit den Funktionen des Produktes mit Hilfe der Gebrauchsanweisung vertraut. Reinigen Sie das Produkt gemäß den Reinigungsangaben in der Gebrauchsanweisung und beachten Sie ggf. die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Pflegeanweisungen und produktspezifische Prüfanweisungen.

Prüfung	OK	Bemerkung
---------	----	-----------

Optische Kontrolle

- Produkt auf Sauberkeit prüfen ggf. gründlich reinigen oder desinfizieren		
- Kontrolle des Oberflächenschutzes verchromte Teile pulverbeschichtete Teile		
- Rahmen, Rücken und Sitzteile auf Beschädigungen prüfen		

Mechanische Kontrolle

- alle Schraub- und Klemmverbindungen prüfen und nachziehen		
- Verriegelungselemente auf Funktion und Vollständigkeit überprüfen		
- Gasdruckfeder für Rückenwinkelverstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen		
- Gasdruckfeder für Sitzwinkelverstellung auf Dichtheit und Funktion prüfen		
- Bowdenzüge auf Funktion und Zustand prüfen		

- Trapezadapter bzw. Verbindungselement zwischen Untergestell und Sitzschale prüfen		
- rastet der Sicherungs- bzw. Arretierbolzen ein?		
- sind Beschädigungen am Trapezadapter?		

Rad und Bremsen

- Luftdruck aller Reifen prüfen		
- Funktion der Trommelbremse prüfen		
- Bowdenzüge in Ordnung?		
- Steckachse spielfrei / leichtgängig? reinigen und leicht einfetten		
- Verriegelungskugeln der Steckachse auf Gängigkeit prüfen		
- Laufdecke auf vorhandenes Profil prüfen		
- Greifringe auf Oberflächenzustand prüfen		
- Greifringe auf festen zustand prüfen		
- Rad-Rundlauf prüfen		
- Schwenkbereich der Lenkräder überprüfen		
- Rad- und Laufgeräusche prüfen		
- Speichen der Antriebsräder locker		
- Speichenreflektoren vorhanden		
- Einstellung der Kniehebelbremse prüfen		

Handhabung

- Funktion der Sitzkantelung prüfen (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- Funktion der Rückenverstellung prüfen (stufenlos ohne Einschränkung?)		
- Abklappen des Rücken prüfen		

Fahrttest

- Spurverhalten / Geradeauslauf prüfen		
- Feststellbremsen prüfen		

Endprüfung

- Allgemeine Prüfung des Gesamtsystems mit Insasse		
- Einstellung der Kippsicherungen prüfen		
- Luftdruck der Räder prüfen		
- Senkrechte Lenkradgabelachse der Vorderräder prüfen		
- Dokumentation (Gebrauchsanweisung) ggf. unter www.berollka-aktiv.de downloaden		
- sind alle Aufkleber (insbesondere der Serien-Nr.) vorhanden und gut lesbar		

**Die sicherheitstechnischen Kontrollen dürfen nur von geschultem
Fachpersonal durchgeführt werden!**

Das Hilfsmittel ist zur Auslieferung freigegeben!

Freigabe: durch (Name): _____

Datum: _____

Unterschrift _____